

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТАК-ЗДРАВ»

Е.С. Тюренков

«19» июля 2024



**Жгут силиконовый кровоостанавливающий одноразовый нестерильный «Кобра»
по ТУ 32.50.13.190-001-51379343-2023**

Инструкция по применению
Редакция 3

Россия, г. Москва
2024

Наименование. Жгут силиконовый кровоостанавливающий одноразовый нестерильный «Кобра» по ТУ 32.50.13.190-001-51379343-2023.

Назначение. Жгут силиконовый кровоостанавливающий одноразовый нестерильный «Кобра» по ТУ 32.50.13.190-001-51379343-2023 предназначен для временной остановки кровотечений.

Показания к применению. Необходимость временной остановки артериального или венозного кровотечения на участках тела для предотвращения кровопотери при оказании скорой и первой помощи.

Противопоказания к применению. Противопоказаний нет.

Побочные эффекты, связанные с применением жгута по назначению. 1) Чрезмерное затягивание жгута может вызвать сдавливание мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности; 2) Продолжительное сдавливание конечности жгутом (более 1 часа в летнее время или 30 минут в зимнее время) может привести к омертвлению конечности; 3) Наложение жгута на среднюю треть плеча может привести к травмированию лучевого нерва.

Вид и длительность контакта изделия с организмом человека. Не имеет прямого или опосредованного контакта с организмом человека.

Способ применения. Жгут накладывается поверх одежды или тканевой (бинтовой) прокладки. Для наложения первого тура жгута необходимо растянуть его с максимальным усилием, обернуть вокруг конечности выше места ранения и затянуть максимально туго до прекращения кровотечения из ран. Последующие туры накладываются с меньшим натяжением, однако достаточным для того, чтобы препятствовать расслаблению первого тура. Для закрепления наложенного жгута свободный его конец необходимо обернуть вокруг конечности по наружной поверхности жгута, завести его под второй конец жгута и завязать узлом.

Потенциальные потребители. Медицинский персонал в рамках учреждений здравоохранения, для экстренного применения в машинах скорой помощи, в медицине катастроф, военной и экстремальной медицине, в мобильных спасательных формированиях, в полевых условиях.

Область применения. Жгут предназначен для использования в учреждениях здравоохранения, службах скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильных спасательных формирований, в полевых условиях, а также при оказании первой помощи в быту. Специальная подготовка или квалификация пользователя и (или) третьих лиц для применения изделия по назначению не требуется.

Основные характеристики:

Габаритные размеры изделия:		Физико-механические показатели изделия:	
Длина, мм	1500 (± 15)	Условная прочность при растяжении, МПа	Не менее 5,0
Ширина, мм	30 (± 3)	Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 300
Толщина, мм	3,55 (- 0,5 /+ 1,0)		
Ширина выступа, мм	5 ($\pm 0,5$)		
Толщина выступа, мм	1 (-0,2/+0,4)		

Масса жгута должна составлять $170 \text{ г} \pm 10\%$.

На поверхности жгута не должно быть разрывов, заусенцев, трещин и посторонних включений. На поверхности жгута допустимо образование мелких пузырей и пористости, не влияющих на технические и функциональные характеристики изделия. На оборотной стороне жгута имеется след от транспортной ленты. Данный след не является заводским браком и не влияет на технические и функциональные характеристики изделия.

Комплектность

Жгут силиконовый кровоостанавливающий одноразовый нестерильный «Кобра» по ТУ 32.50.13.190-001-51379343-2023, в составе:

1. Жгут силиконовый кровоостанавливающий одноразовый нестерильный «Кобра» по ТУ 32.50.13.190-001-51379343-2023 – 1 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 экз.

Меры предосторожности

1. Жгут нельзя использовать, если повреждена потребительская упаковка;
2. Жгут нельзя использовать, если он имеет механические повреждения;
3. Жгут не должен иметь перегибов при наложении на конечность;
4. Жгут может быть использован только один раз;
5. Жгут после использования подлежит утилизации в установленном порядке;
6. Не использовать жгут при окончании срока годности, указанного на упаковке.
7. Жгут накладывается: в теплое время года (+4°C и выше) - на время не более чем на один час, и на время не более получаса в холодное время года (ниже +4°C).

Хранение и транспортирование. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +70 °С, относительной влажности до 80%, атмосферном давлении от 70 кПа до 106,7 кПа по ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия внешних деформаций, кислых, щелочных, масляных сред.

Очистка и дезинфекция. Одноразовое изделие, очистке и дезинфекции не подлежит.

Техническое обслуживание и ремонт. Жгут не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Утилизация. По окончании срока службы, Жгут не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. В этой связи утилизация может производиться по СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 Жгут относится к классу Б – эпидемиологические опасные отходы.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий, при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.

Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «ТАКТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» (ООО «ТАК-ЗДРАВ»), 115088, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. 2-я машиностроения, д. 17, стр. 1, помещ. 1Н/2, +7(963)608-23-35, info@tactical-health.ru.

Символы.

	Изготовитель
	Дата изготовления
	Использовать до
	Код партии
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Беречь от влаги
	Беречь от воздействия солнечных лучей
	Вверх

Перечень национальных стандартов.

1. ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования».

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 3 (75и)
листа(ов).

Генеральный директор ООО «ТАК-ЗДРАВ»
Тюренков Е.С.
«1» октября 2024 г.

