

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «МИЦАР-Н»



О. А. Щеглов

Бинт фиксирующий эластичный нестерильный
по ТУ 9393-001-18909432-2007

Инструкция по применению

Предназначение и область применения медицинского изделия.

Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (далее по тексту – бинт), предназначенный для оказания первой само и взаимопомощи, для фиксации и наложения повязок на суставах и частях тела имеющую коническую или окружную форму, а также для крепления лангет, зондов, катетеров.

Бинт может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых и домашних условиях.

Бинт представляет собой изделие, состоящее из тканого полотна состоящего из полиамидных и вискозных волокон.

Бинт выпускается в индивидуальной упаковке, нестерильный, в рулонах 27 типоразмеров.

Показания для применения медицинского изделия.

Бинт предназначен для оказания первой само и взаимопомощи, для фиксации и наложения повязок на суставах и частях тела имеющую коническую или окружную форму, а также для крепления лангет, зондов, катетеров.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции – побочные действия отсутствуют.

Противопоказания для применения медицинского изделия.

Воспалительные, инфекционные поражения кожных покровов в месте наложения бинта.

Не применять на открытых раневых поверхностях.

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья, местные заболевания кожи.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Бинт следует накладывать достаточно туго, чтобы фиксировать повязки, при этом стараясь не помешать кровообращению.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.

Негативного воздействия с другими медицинскими изделиями - не выявлено.

Порядок работы:

1. Убедиться в целостности индивидуальной упаковки бинта и не истек ли срок годности бинта.
2. Подобрать бинт необходимых Вам размеров. Размер указан на упаковке.
3. Применить бинт по назначению.

Краткие технические характеристики.

Бинт выпускается в виде рулонов, намотанных без гильз, следующих размеров, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Линейные размеры	Величина показателя		
Ширина, см	5,0±0,5	7,5±0,5	10,0±0,5
Длина, см	100,0±5,0	100,0±5,0	100,0±5,0
	150,0±5,0	150,0±5,0	150,0±5,0
	200,0±5,0	200,0±5,0	200,0±5,0
	250,0±5,0	250,0±5,0	250,0±5,0
	300,0±5,0	300,0±5,0	300,0±5,0
	350,0±5,0	350,0±5,0	350,0±5,0
	400,0±5,0	400,0±5,0	400,0±5,0
	450,0±5,0	450,0±5,0	450,0±5,0
	500,0±5,0	500,0±5,0	500,0±5,0

Материал бинта: полотно тканое, состоящее из полиамидное волокно (ТУ 6-13-92-94) – 50%, вискозное волокно (ТУ 6-12-05763398-97) – 50%.

Бинт не должен иметь складок, загрязненных участков.

Основные параметры бинтов указаны в таблице 2.

Таблица 2

Растяжимость, %	Поверхностная плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка, Н (кгс)
Не менее 30, но не более 100	Не менее 40,0, но не более 120	Не менее 58,8 (6)

Индивидуальная упаковка бинта должна быть целостная.

Комплектность.

В комплект поставки должно входить:

- бинт одного размера – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка с маркировкой – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 экз. на групповую упаковку.

Маркировка

На наружной стороне индивидуальной упаковки бинта должно быть указано:

- наименование бинта;
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес или товарный знак (при наличии);
- обозначение настоящих технических условий;
- дата изготовления и номер партии (серии);
- размер бинта;
- срок годности;
- условия хранения;
- номер регистрационного удостоверения;
- состав изделия.

Маркировка наносится на индивидуальную упаковку типографским методом или наносится на этикетку которая наклеивается на индивидуальную упаковку.

Упаковка

Бинт должен иметь первичную индивидуальную упаковку.

Для первичной упаковки бинта должны применять следующие материалы:

- бумажная (картонная) упаковка ГОСТ 6658;
- пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354 или по ГОСТ 16337;
- пленка полипропиленовая производства АО «Артпласт», Россия (ТУ 2245-002-56845376-2015).

Транспортирование и хранение.

Бинты, транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, при температуре от минус 20°C до плюс 40°C - в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Бинты следует хранить в упакованном виде на стеллажах в закрытом складском помещении при температуре от плюс 18°C до плюс 30°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, защищенными от воздействия прямым солнечных лучей.

Срок годности.

Гарантийный срок годности-5 лет со дня изготовления.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие бинтов требованиям ТУ 9393-001-18909432-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

Специальные меры предосторожности при утилизации бинтов не требуются. Утилизировать в недоступных для детей местах как медицинские отходы класса А согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях бинт утилизируются вместе с бытовыми отходами.

Производитель медицинского изделия.

ООО «МИЦАР-Н»

Адрес (место нахождения) юридического лица: 109145, Россия, г. Москва, ул. Пронская, д.2

Телефон: (495)748-01-44

Директор
ООО «МИЦАР-Н»


О.А. Щеглов
Простито, пронумеровано,
скреплено печатью
4

