

Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения активности фактора VIII для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фактор VIII)» по ТУ 21.20.23-092-42349142-2020.

Макет этикетки реагента «АПТВ -реагент»



Макет этикетки реагента «Кальция хлорид»



Макет этикетки реагента «Калибровочная плазма»



Макет этикетки реагента «Дефицитная по фактору VIII плазма»



Макет этикетки реагента «Трис-буфер»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Внешний вид «Набор реагентов для определения активности фактора VIII для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фактор VIII)» по ТУ 21.20.23-092-42349142-2020. Лицевая сторона изделия

Серия № А207026
Годен до 02.2022
Дата изготовления 07.2020

Набор реагентов для определения активности фактора VIII для линейки коагулометров «Technology Solution»

TECHNOLOGY SOLUTION

TS-ФАКТОР VIII

каталожный номер **864**

определений **20-40**

Хранить при +2 ... +8°C



TS-Фактор VIII
ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения активности фактора VIII для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Фактор VIII» предназначено для определения активности фактора VIII в плазме крови на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution». Определение фактора VIII используется для диагностики гемофилии А, для контроля заместительной терапии больных гемофилией А концентратами фактора VIII, а также для диагностики тромбофилии, обусловленной повышенным уровнем фактора VIII.

Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения набора: клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Определяют время свертывания плазмы крови в смеси с содержащей дефицитную по фактору VIII плазму, разведенную исследуемую плазму и АПТВ-реагент, в присутствии ионов кальция. Количественное определение активности фактора VIII выполняются по графику зависимости активности фактора VIII (в %) от времени свертывания с АПТВ-реагентом.

Состав набора:

1. АПТВ-реагент (жидкий реагент), 2,5 мл - 1 фла.
2. Кальция хлорид (рабочий раствор), 10 мл - 1 фла.
3. Калибровочная плазма (лиофилизно высушенная), на 1 мл - 1 фла.
4. Дефицитная по фактору VIII плазма (лиофилизно высушенная), на 1 мл - 3 фла.
5. Трис-буфер (рабочий раствор), 10 мл - 1 фла.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 864

Набор реагентов для определения активности фактора VIII для линейки коагулометров «Technology Solution»

(TS-Фактор VIII)

ТУ 21.20.23-092-42349142-2020

Серия Д207026

Годен до 02.2022

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид АПТВ-реагента	Жидкость светло-	Жидкость светло-

Внешний вид «Набор реагентов для определения активности фактора VIII для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фактор VIII)» по ТУ 21.20.23-092-42349142-2020. Тыльная сторона изделия

TS-ФАКТОР VIII

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ФАКТОР VIII

Состав набора:

1. АПТВ-реагент (жидкий реагент), 2,5 мл - 1 фл.
2. Кальция хлорид (рабочий раствор), 10 мл - 1 фл.
3. Калибровочная плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл - 1 фл.
4. Дефицитная по фактору VIII плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл.
5. Трис-буфер (рабочий раствор), 10 мл - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-092-42349142-2020
ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

864



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2

(два) листов

14 октября 2010 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

