

Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ)» по ТУ 21.20.23-114-42349142-2021.

Комплектация № 1:

Макет этикетки реагента «ПДФ-латекс»



Макет этикетки реагента «ПДФ-буфер»



Макет этикетки реагента «ПДФ-калибратор»




Комплектация № 2:

Макет этикетки реагента «ПДФ-латекс»



Макет этикетки реагента «ПДФ-буфер»

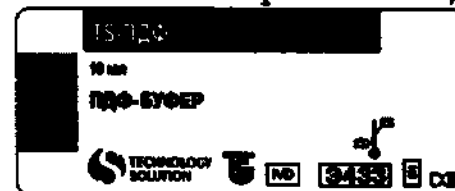

**Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»**



А.П. Момот

Макет упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ)» по ТУ 21.20.23-114-42349142-2021.

Комплектация № 1



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

() листов

2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы

«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор реагентов для количественного определения ПДФ на
коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ)»
по ТУ 21.20.23-114-42349142-2021**




ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 919
Набор реагентов для количественного определения ПДФ
на коагулометрах «Technology Solution»
(TS-ПДФ)
ТУ 21.20.23-114-42349142-2021

Серия E218010

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

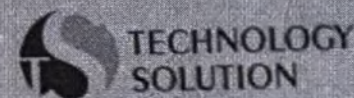

TS-ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для количественного
определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПДФ» предназначено для количественного определения продуктов деградации фибриногена и фибрина (ПДФ) в плазме крови человека методом имунотурбидиметрии на коагулометрах «Technology Solution». ПДФ являются маркером активации свертывания крови и фибринолиза, поскольку они формируются в кровотоке в результате лизиса плазмином фибриногена и фибрина.

TS-ПДФ

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ПДФ

Состав набора:

1. ПДФ-латекс (суспензия латексных частиц, покрытых мышиными моноклональными антителами к ПДФ), 10 мл – 1 фл.
2. ПДФ-буфер, 10 мл – 1 фл.
3. ПДФ-калибратор (лиофильно высушенная плазма крови человека, обогащенная ПДФ), на 1 мл – 1 фл. Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-114-42349142-2021

РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,

а/я 1351,

тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

919



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,

а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 919

Набор реагентов для количественного определения ПДФ
на коагулометрах «Technology Solution»
(TS-ПДФ)

ТУ 21.20.23-114-42349142-2021

Серия E218010

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

TS-ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для количественного
определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПДФ» предназначено для количественного определения продуктов деградации фибриногена и фибрина (ПДФ) в плазме крови человека методом иммунотурбидиметрии на коагулометрах «Technology Solution». ПДФ являются маркером активации свертывания крови и фибринолиза, поскольку они формируются в кровотоке в результате лизиса плазмином фибриногена и фибрина.

Серия № E218012
Годен до 02.2023
Дата изготовления 08.2021

Хранить при +2 ... +8°C

Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution»

125
определений



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ПДФ

каталожный номер **920**



ООО фирма Technology Solution

ПАСПОРТ № 920
Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ)
ТУ 21.20.23-114-42349142-2021

Серия E218012

Годен до 02.2023

Должное значение по ТУ	Фактическое значение



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ
Медицинское изделие «TS-ПДФ» предназначено для количественного определения продуктов деградации фибриногена и фибрина (ПДФ) в плазме крови человека методом иммунотурбидиметрии на коагулометрах «Technology Solution». ПДФ являются маркером активации свертывания крови и фибринолиза, поскольку они формируются в кровотоке

TS-ПДФ

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ПДФ

Состав набора:

- 1. ПДФ-латекс (суспензия латексных частиц, покрытых мышиными моноклональными антителами к ПДФ), 10 мл – 1 фл.
- 2. ПДФ-буфер, 10 мл – 1 фл.

Произведено ООО фирмой «Технология-Стандарт» по заказу ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

ТУ 21.20.23-114-42349142-2021
РУ №

Каталожный номер

920

 **TECHNOLOGY SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru

 **8-800-551-61-71**



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 920

Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ)

ТУ 21.20.23-114-42349142-2021

Серия E218012

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение

 **TECHNOLOGY SOLUTION**

TS-ПДФ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Набор реагентов для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПДФ» предназначено для количественного определения продуктов деградации фибриногена и фибрина (ПДФ) в плазме крови человека. Методом иммунотурбидиметрии на коагулометрах «Technology Solution». ПДФ являются маркером активации свертывания крови и фибринолиза, поскольку они формируются в кровотоке.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5

пять) листов

22 декабря 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

