



Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда для линейки автоматических коагулометров «Technology Solution» (TS-Виллебранд Ag)» по ТУ 21.20.23-107-42349142-2021.

Комплектация № 1:


Макет этикетки реагента «Буфер»

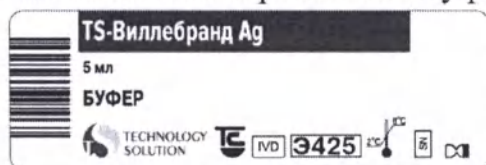

Макет этикетки реагента «Латексный реагент»

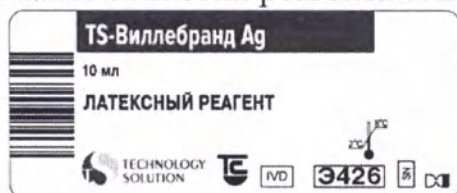


Макет этикетки реагента «Калибровочная плазма»

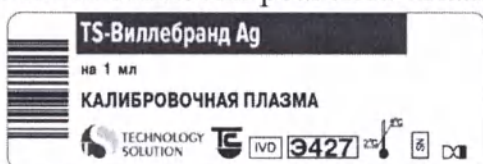


Комплектация № 2:

Макет этикетки реагента «Буфер»

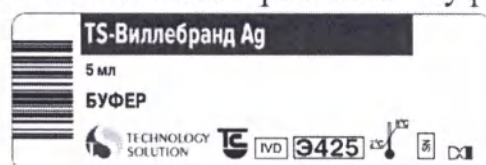

Макет этикетки реагента «Латексный реагент»

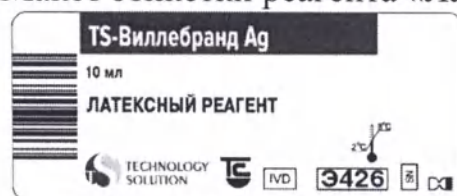

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Макет упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда для линейки автоматических коагулометров «Technology Solution» (TS-Виллебранд Ag)» по ТУ 21.20.23-107-42349142-2021.

Комплектация № 1



Красочная группа: САУК

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28



Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

2

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2
(два) листов

20 21 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда для
линейки автоматических коагулометров «Technology Solution»
(TS-Виллебранд Ag)» по ТУ 21.20.23-107-42349142-2021**



(КХ) ШИРМА Технологии Стандарт

ПАСПОРТ № 914

Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда
для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Виллебранд Ag)
ТУ 21.20.23-107-42349142-2021

Серия E215010

Годен до 11.2022



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS- ВИЛЛЕБРАНД Ag

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для определения антигена фактора
Виллебранда для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution» (TS-Виллебранд Ag)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Виллебранд Ag» предназначено для количественного определения антигена фактора Виллебранда (vWF:Ag) в плазме крови. Фактор Виллебранда (vWF) – крупный мукополимерный гликопротеин, основными функциями которого являются участие в регуляции тромбоцитов путем его связывания с гликопротеином IIb, а также защита эндотелиального глобулина от протеолиза. Определение vWF Ag является одним из наиболее распространенных методов диагностики геморрагического заболевания, основой которого является дефицит или функциональная недостаточность vWF (болезнь Виллебранда, синдром Виллебранда). Кроме того, этот метод целесообразно использовать для контроля эффективности

TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

Состав набора:

1. Буфер, 5 мл – 2 фл.
 2. Латексный реагент (суспензия латексных частиц, покрытых антителами к фактору Виллебранда), 10 мл – 2 фл.
 3. Калибровочная плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл – 1 фл.
- Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.
- ТУ 21.20.23-107-42349142-2021
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

914



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для определения антигена фактора
Виллебранда для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution» (TS-Виллебранд Ag)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Виллебранд Ag» предназначено для количественного определения антигена фактора Виллебранда (vWF:Ag) в плазме крови. Фактор Виллебранда (vWF) – крупный мукополисахарид гликопротеин, основным функцией которого является участие в адгезии тромбоцитов путем его связывания с гликопротеином IIb, а также защита антигемофильного глобулина от протеолитического расщепления. vWF:Ag является одним из наиболее распространенных методов диагностики геморрагического заболевания, в основе которого имеется дефицит или функциональная неполноценность «vWF (Фактор Виллебранда, антиген Виллебранда)». Кроме того, этот метод целесообразно использовать для контроля эффективности

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 914

Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда
для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Виллебранд Ag)
ТУ 21.20.23-107-42349142-2021

Серия E215010

Годен до 11.2022

Получено, значимое, фактическое



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 915

Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда
для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Виллебранд Ag)
ТУ 21.20.23-107-42349142-2021

Серия E215012

Годен до 11.2022



TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для определения антигена фактора
Виллебранда для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution» (TS-Виллебранд Ag)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Виллебранд Ag» предназначено для количественного определения антигена фактора Виллебранда (vWF:Ag) в плазме крови. Фактор Виллебранда (vWF) – крупный мукополимерный гликопротеин, основным функциями которого являются участие в адгезии тромбоцитов путем его связывания с гликопротеином IIb/3a (также называемым антигеном тромбоцитов) и отрывания. Определение vWF:Ag является одним из наиболее распространенных методов диагностики геморрагического заболевания, в основе которого имеется дефицит или функциональная неполноценность vWF (фактора Виллебранда, синдрома Виллебранда). Кроме того, этот метод целесообразно использовать для контроля эффективности

TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

Состав набора:

1. Буфер, 5 мл – 2 фл.
2. Латексный реагент (суспензия латексных частиц, покрытых антителами к фактору Виллебранда), 10 мл – 2 фл.

ТУ 21.20.23-107-42349142-2021

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

915



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ВИЛЛЕБРАНД Ag

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор реагентов для определения антигена фактора
Виллебранда для линейки автоматических коагулометров
«Technology Solution» (TS-Виллебранд Ag)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Виллебранд Ag» предназначено для специфического определения антигена фактора Виллебранда (vWF-Ag) в плазме крови. Фактор Виллебранда (vWF) – крупный мукополимерный гликопротеин, основным из функций которого является участие в адгезии тромбоцитов путем его связывания с гликопротеином IIb/IIIa также защиты антигемофильного глобулина от протеолиза. Определение vWF-Ag является одним из наиболее востребованных методов диагностики геморрагического заболевания, в основе которого имеется дефицит или функциональная неполноценность vWF (болезнь Виллебранда, синдром Виллебранда). Кроме того, этот метод широко применяется для контроля эффективности

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 915

Набор реагентов для определения антигена фактора Виллебранда
для линейки автоматических коагулометров

«Technology Solution»

(TS-Виллебранд Ag)

ТУ 21.20.23-107-42349142-2021

Годен до 11.2022

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5

5) листов

12.12.2017 2017 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

