

Внешний вид «Набор реагентов для определения протеина С для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Протеин С)» по ТУ 21.20.23-096-42349142-2020. Лицевая сторона изделия



TS-Протеин С
ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения протеина С для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Протеин С» предназначено для определения активности (в процентах от нормы) протеина С в плазме крови на линейке коагулометров «Technology Solution». Протеин С - один из наиболее важных физиологических антикоагулянтов, синтезирующийся в печени при участии витамина К. В активной форме он разрушает коагуляционные факторы свертывания VIIIa и Vа. Наследственный дефицит протеина С приводит к тромбозам и тромбоэмболиям. У новорожденных с дефицитом протеина С возможно развитие фульминантной пурпуры.

Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения набора: клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода: Под влиянием специфического активатора протеин С приобретает способность разрушать хромогенный субстрат. Для вычисления активности протеина С определяют динамику изменения оптической плотности исследуемых образцов при 405 нм.

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 867

Набор реагентов для определения протеина С
для линейки коагулометров
«Technology Solution»

(TS-Протеин С)

ТУ 21.20.23-096-42349142-2020

R208006

Годен до 03.2022

Наименование показателя

Должное значение

Фактическое

TS-ПРОТЕИН С

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ПРОТЕИН С

Состав набора:

1. Активатор протеина С (лиофильно высушенный),
на 5 мл - 3 фл.
2. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный),
на 3 мл - 1 фл.
3. Растворитель для активатора протеина С,
5 мл - 3 фл.
4. Калибровочная плазма (лиофильно высушенная),
на 1 мл - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg
отсутствуют.

ТУ 21.20.23-096-42349142-2020
ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

867



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru



8-800-551-61-71

Пропиновано, пронумеровано
и скреплено печатью д
(225)) листов

«Технология-Стандарт» 2020г.
Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот