

Обувь ортопедическая малосложная детская

по ТУ 32.50.22-001-15577047-2017

Инструкция по эксплуатации

Версия от «16» декабря 2019г.

Перед применением требуется обязательная консультация со специалистом.

Инструкция по эксплуатации распространяется на обувь ортопедическую малосложную детскую по ТУ 32.50.22-001-15577047-2017 (варианты исполнения см. приложение) предназначенную для профилактики и лечения статических нефиксированных деформаций стоп у детей.

Обувь соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 54407-2011, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ТР ТС 007-2011, ТУ 32.50.22-001-15577047-2017.

Показания к применению обуви:

- незначительно выраженные статодинамические нарушения вследствие функциональной недостаточности стоп и плоскостопия;
- стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций стоп.

Абсолютные противопоказания:

- обширные трофические язвы стопы;
- гангрена;
- распространенные гнойные процессы в мягких тканях;
- отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани;
- аллергические реакции на материалы обуви.

Режим и способ применения обуви (длительность, частота ношения, использования) строго по назначению врача, согласно настоящей инструкции по эксплуатации на обувь.

Обувь предназначена для эксплуатации в условиях повседневной жизни в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150 при температуре внешней среды от плюс 35 до минус 25 °С.

Возможные побочные эффекты: при правильной эксплуатации – не выявлены. Возможна индивидуальная аллергическая реакция на применяемые материалы

Основные материалы:

наружные детали верха - натуральная кожа, внутренние детали верха (в зависимости от варианта исполнения) - натуральная кожа, мех шерстяной на трикотажной основе, байка; основная стелька (в зависимости от варианта обуви) – мех шерстяной на трикотажной основе, байка, кожа; подошва - термопластичная резина ТЭП.

Правила эксплуатации:

При покупке обуви правильно подбирайте обувь по размеру и объему (полноте) стопы: стопа в обуви не должна быть сжата. Обувь необходимо менять по мере роста стопы.

- Фиксируйте обувь на стопе с помощью фурнитуры жестко, но при этом, не пережимая стопу.
- Снимайте и надевайте обувь, только расшнуровав или расстегнув ее полностью. Не снимайте обувь, наступая на задник;
- Надевайте при помощи специального рожка, чтобы предотвратить деформацию обуви и разрыв швов;
- Не применяйте новую обувь для длительных путешествий, т.к. требуется некоторое время, чтобы обувь приняла индивидуальную форму стопы;
- Кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. не является непромокаемой.
- При повышенной потливости ног или намокании обувь может окраситься изнутри. Это не является дефектом.
- Ежедневно просушивайте обувь при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов;

- Перед нанесением чистящих средств удаляйте с обуви грязь и пыль обувной щеткой, влажной тканью или резиновой щеткой;
- Ухаживайте за обувью с помощью специального средства для обуви (обувного цветного или бесцветного крема, аэрозоли для обуви), которое наносите на чистую, сухую поверхность. После впитывания средства в обувь полируйте поверхность щеткой или специальной салфеткой. В сырую погоду используйте водоотталкивающие средства для обуви;
- Храните обувь в хорошо проветриваемом или вентилируемом месте;
- Не рекомендуется надевать ортопедическую обувь на голую ногу;
- Запрещается: мыть обувь, опуская ее в воду, подвергать обувь воздействию агрессивных моющих средств, кислот, щелочей, растворителей и воздействиям механического характера (удары, порезы и т.д.)

Рекомендации по ношению обуви:

Особые предупреждения при ношении ортопедической обуви:

В первые дни ношения ортопедической обуви возможны непривычные ощущения. Пусть это вас не тревожит: ваши мышцы и суставы «привыкли» к патологической позиции, и требуется время, чтобы правильная постановка стоп вновь стала нормой жизни.

В первые недели ношения ортопедической обуви возможны покраснения в местах давления и небольшие мозоли.

Рекомендуемое время ношения ортопедической обуви:

Первые 3 дня — с 1,5 до 3-х часов в день.

Следующие 7-10 дней — до 5 часов в день.

Привыкание к ортопедической обуви — индивидуально и в среднем составляет от 2-х до 6 недель.

Основные параметры и технические характеристики:

Характеристики конкретного артикула изделия указаны на маркировке изделия и упаковке (размер, полнота, цвет, материалы изготовления)

Обувь изготавливается парами.

Комплект поставки:

- обувь — 1 пара;

- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

- упаковка — 1 шт.

Упаковка: Обувь упакована в потребительскую тару (полиэтиленовые пакеты, или коробки, или другие упаковочные материалы, обеспечивающие сохранность продукции) вместе с инструкцией по эксплуатации.

Хранение: Обувь хранят в складских помещениях при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 50%-80% в крытых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Условия хранения должны исключать возможность воздействия на обувь прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

Гарантийные обязательства:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона: 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя. При невыполнении рекомендаций по уходу за обувью претензии по ее качеству не принимаются!

Гарантийный срок хранения обуви: 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация: совместно с бытовыми отходами.

Претензии потребителей принимает производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БОС», адрес: Россия, 350075, г.Краснодар, ул. Старокубанская, д.145, офис 1. Телефон: 8(918)046-66-23, e-mail: Bos-orto.com.

Генеральный директор ООО «БОС» _____ Жигулин А. А.

Обувь ортопедическая малосложная детская

Варианты исполнения:

Обувь ортопедическая малосложная для школьников-девочек.

1. Сапоги:

Артикулы: 183-12, 183-72, 182-031, 182-13, 182-93, 042-13, 141-83, 141-13, 143-13

Размеры: от 32 до 33.

2. Ботинки:

Артикулы: 131-822, 131-12, 131-111, 131-222, 131-52, 136-924, 136-823, 131-224, 136-121, 152-82, 152-92, 152-129, 201-82, 401-011, 401-61, 401-91, 402-11, 402-82, 173-111, 153-02, 157-22, 157-12, 157-92, 202-52, 202-12, 152-93, 152-83, 201-121, 201-122

Размеры: от 32 до 36

3. Полуботинки:

Артикулы: 104-01, 104-91, 104-41, 211-112, 211-711, 211-51

Размеры от 32 до 36

Туфли:

Артикулы: 021-91, 021-81, 021-01, 022-811, 022-01, 022-912, 024-13, 024-141, 024-01, 024-71, 024-712, 024-131, 072-915, 072-812.

Размеры от 32 до 36

4. Сандалии:

Артикулы: 163-31, 055-01, 052-01, 053-61, 164-01, 161-012, 169-01, 165-01, 164-911, 161-01, 161-11, 165-91, 165-111, 032-61, 032-414, 032-013, 052-011, 052-913, 242-912, 056-411, 161-41, 161-814, 161-111, 162-81, 162-91, 163-412, 164-815, 169-012, 169-31.

Размеры: от 32 до 36

Обувь ортопедическая малосложная для школьников-мальчиков.

1. Сапоги:

Артикулы: 042-73, 042-131.

Размеры: от 32 до 33

2. Ботинки:

Артикул: 132-722, 132-221, 135-721, 137-72, 137-142, 137-22, 137-222, 152-22, 152-121, 201-12, 201-72, 201-522, 135-12, 137-723, 138-12, 138-52, 138-72, 173-711, 155-72, 155-52, 152-23, 152-13, 201-53, 201-131.

Размеры: от 32 до 36

3. Полуботинки:

Артикулы: 104-713, 104-71, 104-712, 104-11, 104-711, 103-11, 211-713, 211-511, 211-113,

Размеры: от 32 до 36

4. Туфли:

Артикулы: 071-511, 071-712, 072-112, 072-12.

Размеры: от 32 до 36

5. Сандалии:

Артикул: 057-51, 164-211, 164-712, 054-713, 054-712, 163-51, 163-71, 051-21, 051-71, 054-51, 168-31, 164-115, 059-212, 057-132, 162-715, 033-71, 033-211, 033-21, 033-11, 058-21, 058-71, 058-11, 051-712, 241-711, 242-71, 057-21, 057-71, 059-61, 168-21, 168-11, 168-712, 054-513.

Размеры: от 32 до 36

Обувь ортопедическая малосложная дошкольная.

1. Сапоги:

Артикулы: 042-73, 042-131, 183-12, 183-72, 182-031, 182-13, 182-93, 042-13, 141-83, 141-13, 143-12.

Размеры: от 27 до 31

2. Ботинки:

Артикулы: 132-722, 132-221, 135-721, 137-72, 137-142, 137-22, 137-222, 152-22, 152-121, 201-12, 201-72, 201-522, 135-12, 137-723, 138-12, 138-52, 138-72, 173-711, 155-72, 155-52, 152-23, 152-13, 201-53, 201-131, 201-121, 131-822, 131-12, 131-111, 131-222, 131-52, 136-924, 136-823, 131-224, 136-121, 152-82, 152-92, 152-129, 201-82, 401-011, 401-61, 401-91, 402-11, 402-82, 173-111, 153-02, 157-22, 157-12, 157-92, 202-52, 202-12,

152-93, 152-83, 201-122.

Размеры: от 27 до 31

3. Полуботинки:

Артикулы: 104-713, 104-71, 104-712, 104-11, 104-711, 103-11, 104-11, 211-713, 211-511, 211-113, 104-01, 104-91, 104-41, 211-112, 211-711, 211-51.

Размеры: от 27 до 31

4. Туфли:

Артикулы: 071-511, 071-712, 072-112, 072-12, 021-91, 021-81, 021-01, 022-811, 022-01, 022-912, 024-13, 024-141, 024-01, 024-71, 024-712, 024-131, 072-915, 072-812.

Размеры от 27 до 31

5. Сандалии:

Артикулы: 057-51, 164-211, 164-712, 054-713, 054-712, 163-51, 163-71, 051-21, 052-01, 051-71, 054-51, 168-31, 164-115, 059-212, 057-132, 162-715, 033-71, 033-211, 033-21, 033-11, 058-21, 058-71, 058-11, 051-712, 241-711, 242-71, 057-21, 057-71, 059-61, 168-21, 168-11, 168-712, 163-31, 055-01, 052-01, 053-61, 164-01, 161-012, 169-01, 165-01, 164-911, 161-01, 161-11, 165-91, 165-111, 032-61, 032-414, 032-013, 052-011, 052-913, 242-912, 056-411, 161-41, 161-814, 161-111, 162-81, 162-91, 163-412, 164-815, 169-012, 169-31, 054-513.

Размеры: от 27 до 31

Обувь ортопедическая малосложная малодетская.

1. Ботинки:

Артикулы: 132-722, 132-221, 135-721, 137-72, 137-142, 137-22, 137-222, 152-22, 152-121, 201-12, 201-72, 201-522, 135-12, 137-723, 138-12, 138-52, 138-72, 173-711, 155-72, 155-52, 152-23, 152-13, 201-53, 201-131, 201-121, 131-822, 131-12, 131-111, 131-222, 131-52, 136-924, 136-823, 131-224, 136-121, 152-82, 152-92, 152-129, 201-82, 401-011, 401-61, 401-91, 402-11, 402-82, 173-111, 153-02, 157-22, 157-12, 157-92, 202-52, 202-12, 152-93, 152-83, 201-122, 151-13, 151-23, 151-73, 151-83, 151-93.

Размеры: от 23 до 26

2. Полуботинки:

Артикулы: 104-713, 104-71, 104-712, 104-711, 104-01, 104-91, 104-41

Размеры от 23 до 26

3. Туфли:

Артикулы: 071-511, 071-712, 072-112, 072-12, 021-91, 021-81, 021-01, 022-811, 022-01, 022-912, 024-13, 024-141, 024-01, 024-71, 024-712, 024-131, 072-915, 072-812.

Размеры: от 23 до 26

4. Сандалии:

Артикулы: 057-51, 164-211, 164-712, 054-713, 054-712, 163-51, 163-71, 051-21, 052-01, 051-71, 054-51, 168-31, 164-115, 059-212, 057-132, 162-715, 033-71, 033-211, 033-21, 033-11, 058-21, 058-71, 058-11, 051-712, 241-711, 242-71, 057-21, 057-71, 059-61, 168-21, 168-11, 168-712, 163-31, 055-01, 052-01, 053-61, 164-01, 161-012, 169-01, 165-01, 164-911, 161-01, 161-11, 165-91, 165-111, 032-61, 032-414, 032-013, 052-011, 052-913, 242-912, 161-41, 161-814, 161-111, 162-81, 162-91, 163-412, 164-815, 169-012, 169-31, 054-513

Размеры: от 23 до 26

Обувь ортопедическая малосложная ясельная.

1. Ботинки:

Артикулы: 132-722, 132-221, 135-721, 137-72, 137-142, 137-22, 137-222, 135-12, 137-723, 138-12, 138-52, 138-72, 173-711, 131-822, 131-12, 131-111, 131-222, 131-52, 136-924, 136-823, 131-224, 136-121, 401-011, 401-61, 401-91, 402-11, 402-82, 173-111, 172-71, 172-132, 151-13, 151-23, 151-73, 151-83, 151-93.

Размеры: от 19 до 22

2. Туфли:

Артикулы: 071-511, 071-712, 072-112, 072-12, 021-91, 021-81, 021-01, 022-811, 022-01, 022-912, 024-13, 024-141, 024-01, 024-71, 024-712, 024-131, 072-915, 072-812.

Размеры: от 19 до 22

3. Сандалии:

Артикулы: 057-51, 164-211, 164-712, 054-713, 054-712, 163-51, 163-71, 051-21, 052-01, 051-71, 054-51,

168-31, 164-115, 059-212, 057-132, 162-715, 058-21, 058-71, 058-11, 051-712, 241-711, 242-71, 057-21, 057-71, 059-61, 168-21, 168-11, 168-712, 163-31, 055-01, 053-61, 164-01, 161-012, 169-01, 165-01, 164-911, 161-01, 161-11, 165-91, 165-111, 052-011, 052-913, 242-912, 056-411, 161-41, 161-814, 161-111, 162-81, 162-91, 163-412, 164-815, 169-012, 169-31, 054-513.

Размеры: от 19 до 22

Варианты исполнения (для всех артикулов): бордо, сирень, черный, изумруд, белый, розовый, фуксия, синий, скай или серый

Полнота всех артикулов: от 5 до 8

Генеральный директор ООО «БОС»

М.П.

Жигулин А. А.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (лист) листов
Должность Генеральный директор
ООО «БОС»
Подпись Жигулин А.А.

