

Инструкция по применению

Паста с алмазным наполнителем для окончательной полировки до состояния сухого блеска композитов и керамики «ПрлирПаст-Д-сухой блеск»

Показания

Полировальная паста для окончательной полировки до состояния сухого блеска поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

Состав

алмазный абразив
водорастворимая полимерная основа
силиконовые добавки
стабилизатор
ароматизатор

Свойства и способ применения

Принцип действия полировочной пасты основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит шлифовку и окончательную полировку до состояния сухого блеска сформированной пломбы из композитных материалов.

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество полировальной пасты. Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тысяч об/мин., и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

Упаковка и хранение

Материал "ПолирПаст - D - сухой блеск" расфасован в 2 шприца по 3 мл.

Хранить при температуре от +4⁰С до +24⁰С.

Срок годности – 3 года.

Произведено: ООО «НКФ Омега-Дент» г.Москва, ул. Угрешская, д.31

Ген. Директор ООО
«НКФ Омега-Дент»

Г.Г.Ростиашвили



Ваш