



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

/ Ростиашвили Г.Г.

«09» декабря 2024 г.

Инструкция по применению

Материал – жидкость противокариесная профилактическая «Фторлак прозрачный» по ТУ 9391-031-49908538-2008

Показания

- После снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов.
- На терапевтическом приеме: при кариесе в стадии пятна, кариесе корня, клиновидных дефектах, при лечении гиперестезии, после полировки эмали.
- На ортопедическом приеме: для защиты живой культи отпрепарированного зуба, при обработке контактных поверхностей соседних зубов, при фиксации кламерных конструкций.
- На пародонтологическом приеме: после кюретажа пародонтальных карманов для защиты шеек зуба, при цервикальной гиперестезии.
- Лечение и профилактика кариеса у детей: сохранение молочных зубов, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов, в стадии созревания фиссур, при незрелых фиссурах.

Состав и свойства:

«Фторлак прозрачный» представляет собой бесцветную суспензию. В качестве активного компонента содержит аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью и большей безопасностью.

Способ применения

Зубы предварительно изолировать от слюны, используя ватные валики. Высушить изолированные зубы сжатым воздухом. На высушенную поверхность зубов нанести тонким слоем «Фторлак прозрачный» с помощью обычных аппликаторов типа «микробраш». Через 10-15 сек «Фторлак прозрачный» высохнет самостоятельно. При необходимости его можно подсушить сжатым воздухом. Можно нанести второй слой лака и подсушить воздухом для скорейшего высыхания. Пациента следует предупредить о том, что не следует принимать твердую пищу в течение 2-х часов и не проводить чистку зубов в течение 12 ч после проведения процедуры. Для поддержания противокариозного эффекта повторное покрытие необходимо проводить через

3-6 месяцев. В процессе применения следует плотно укупоривать флакон, чтобы избежать испарения растворителя и последующего подсыхания и загустения лака.

Возможно выпадение осадка, не влияющего на физико-химические свойства материала. **Перед употреблением взболтать!**

Упаковка и хранение

«Фторлак прозрачный» расфасован во флакон ёмкостью 13 мл. Хранить следует плотно укупоренным в сухом и темном месте при температуре от +4⁰С до +24⁰С.

Срок годности – 3 года.

Производитель: ООО «НКФ Омега-Дент», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 31, к.3, офис 211-212

Место производства: ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ», Московская область, 142116 г. Подольск, ул. Лобачева, д.6, стр.24

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два)

листа(ов).

Г. Костин

