



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НКФ Омега - Дент”

Разработка и производство стоматологических материалов

115088 г.Москва, ул. Угрешская д.31, тел/факс (495)679-80-53; (495)783-26-09

Справка об изделии медицинского назначения

Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов «Фенопласт»

Показания к применению

Перелечивание корневых каналов, ранее пломбированных пастой на основе фенолальдегидных смол.

Свойства

В случаях повторного пломбирования корневого канала возникает необходимость очистить корневой канал от ранее запломбированного материала. Для этого применяют специальные жидкости, облегчающие проведение подобных манипуляций. «ФЕНОПЛАСТ» (жидкость для распломбирования корневых каналов) применяется для размягчения паст на основе фенолальдегидных смол.

«Фенопласт» представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость с эфирным запахом пентилацетата.

Состав:

фенилэтиловый спирт; формамид.

Способ применения

1.Метод для распломбирования каналов в результате одного посещения.

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести каплю «Фенопласт» в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 минуту с целью размягчения смолы. Затем начать обработку эндодонтическим инструментом, постоянно смачивая кончик инструмента жидкостью «Фенопласт». После прохождения $\frac{1}{2}$ канала следует повторно

заполнить канал жидкостью “Фенопласт” и оставить на 1 минуту с целью размягчения смолы в нижней части канала.

Затем следует начать обработку эндодонтическим инструментом, постоянно смачивая кончик инструмента жидкостью “Фенопласт”, до тех пор, пока не будет достигнут апекс. После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

2.Метод для распломбирования каналов в результате двух посещений.

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью “Фенопласт” и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной пасты корневого канала механическим путем, что не будет представлять особой трудности.

После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

Упаковка и условия хранения

Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл. Хранить в сухом прохладном, защищенном от солнечных лучей месте.

Срок годности - 3 года.

Класс в зависимости от потенциального риска применения –2а по ГОСТ Р 51609-2000.

Ген. Директор ООО
“НКФ Омега-Дент”



Г.Г.Ростиашвили