


Инструкции по сборке медицинского изделия
«Столы медицинские по ГИКС.942810.114ТУ»

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942810.114 ТУ
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.1)

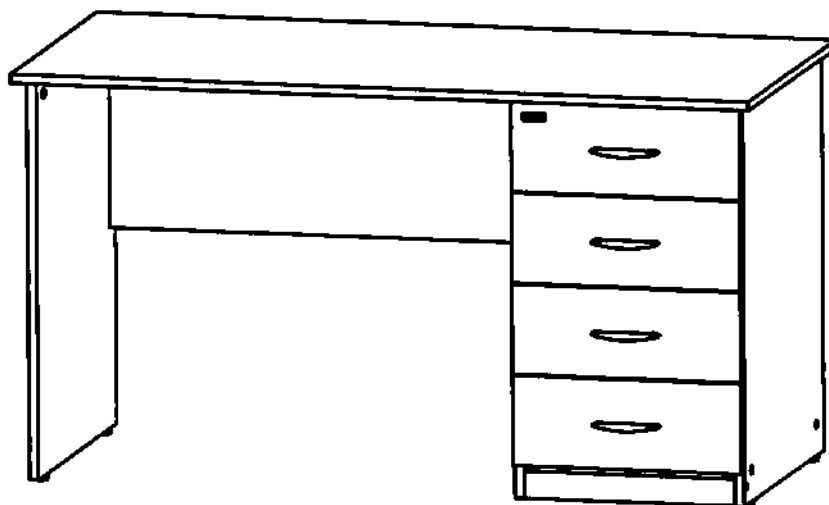

Условные обозначения:

1. А-Н : детали

2. 1 - 13 : крепёж и фурнитура



3. 1 - 18 : этапы сборки

Код товара: _____

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	1
Д	Стенка средняя	1
Е	Основание тумбы	1
Ж	Стенка задняя тумбы	1
З	Царга	1
И	Фасад выдвижного ящика	4
К	Стенка левая выдвижного ящика	4
Л	Стенка правая выдвижного ящика	4
М	Стенка задняя выдвижного ящика	4
Н	Дно выдвижного ящика	4

Крепёж и фурнитура

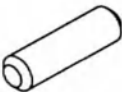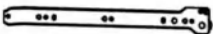Арт.	Кол - во	Обозначение		
1*	26	Конфирмат		
2	10	Заглушка конфирмата		
3	38	Шкант мебельный		
4	14	Эксцентрик		
5	14	Шток эксцентрика		
6	14	Заглушка эксцентрика		
7	20	Гвоздь 1,6x25		
8	4 комплекта	Направляющие роликовые	 8/1	 8/2
9	48	Саморез 3,5x13		
10	4 комплекта	Ручка мебельная	 11/1	 11/2
11	1	Логотип компании		
12*	1	Ключ шестигранный		
13	6	Опора стола		

* Конфирматы 1 закручивать ключом шестигранным 12 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой


Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

Бх1 шт.

3х2 шт.


4х2 шт.

13х4 шт.

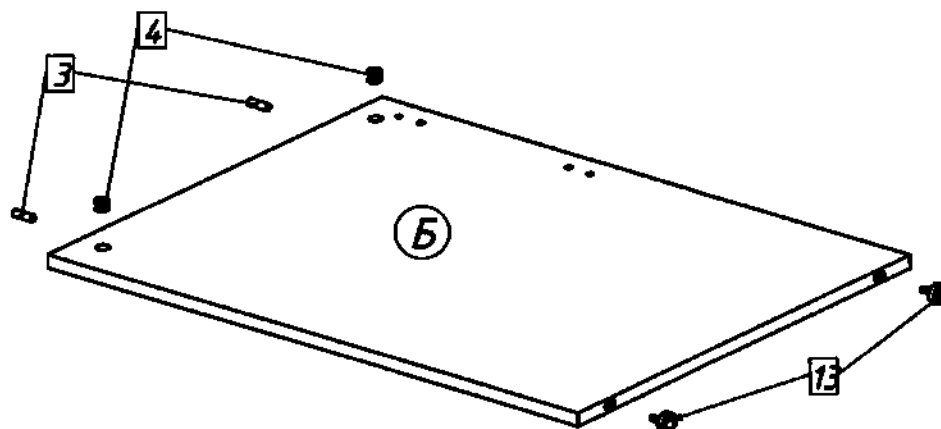

2 этап

Произведите сборку стенки правой

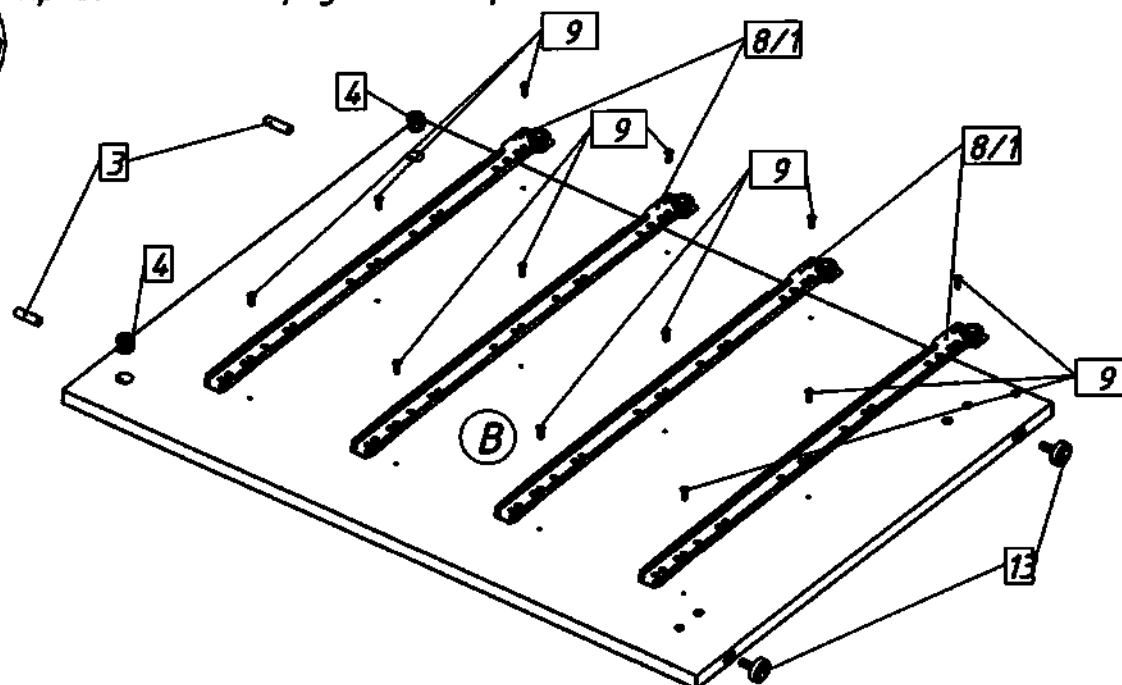

Вх1 шт.

3х2 шт.

4х2 шт.


8/1х4 шт.

9х12 шт.

13х2 шт.

3 этап

Произведите сборку стенки задней

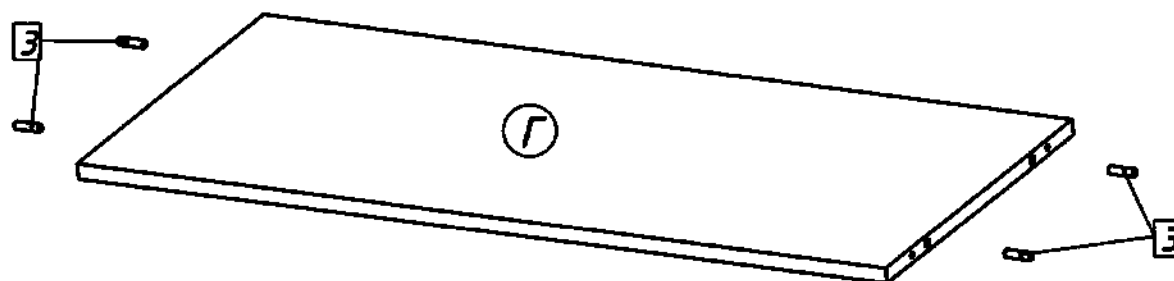

Гх1 шт.

3х4 шт.

Дх1 шт.

3х2 шт.


4х2 шт.

8/1х4 шт.

9х12 шт.

13х2 шт.

4 этап

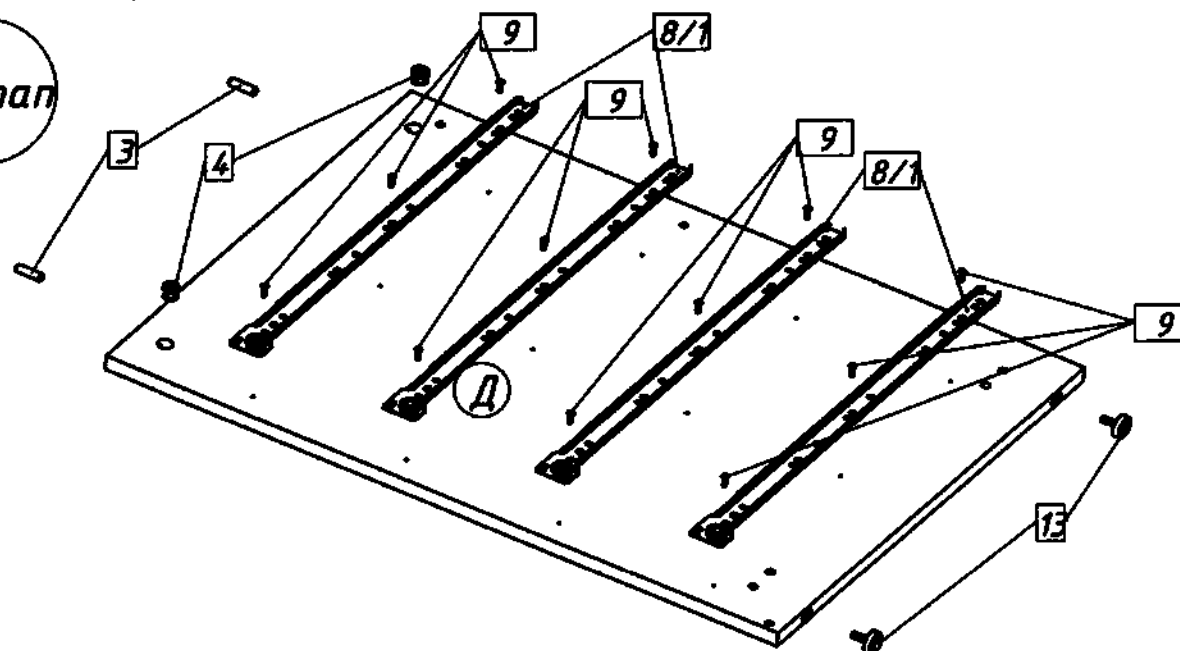


5 этап

Произведите сборку основания тумбы

Ех1 шт.

3х4 шт.

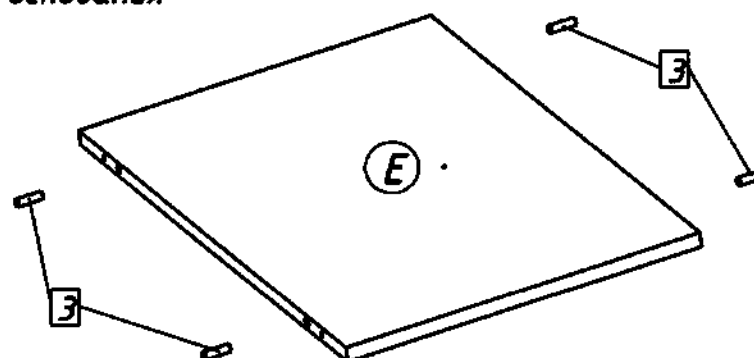

6 этап

Произведите сборку каркаса стола, соединив между собой стенку левую, стенку среднюю и стенку заднюю


Бх1 шт.

Гх1 шт.


Дх1 шт.

1х4 шт.

2х4 шт.

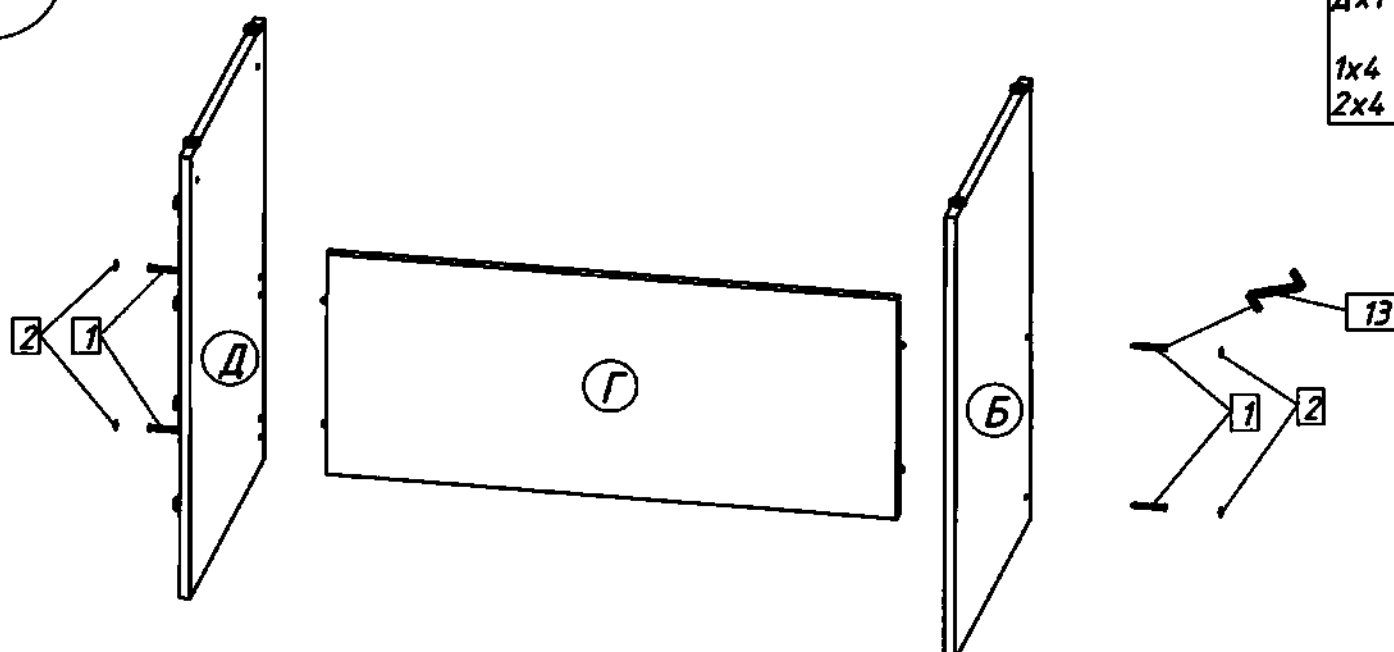

7 этап

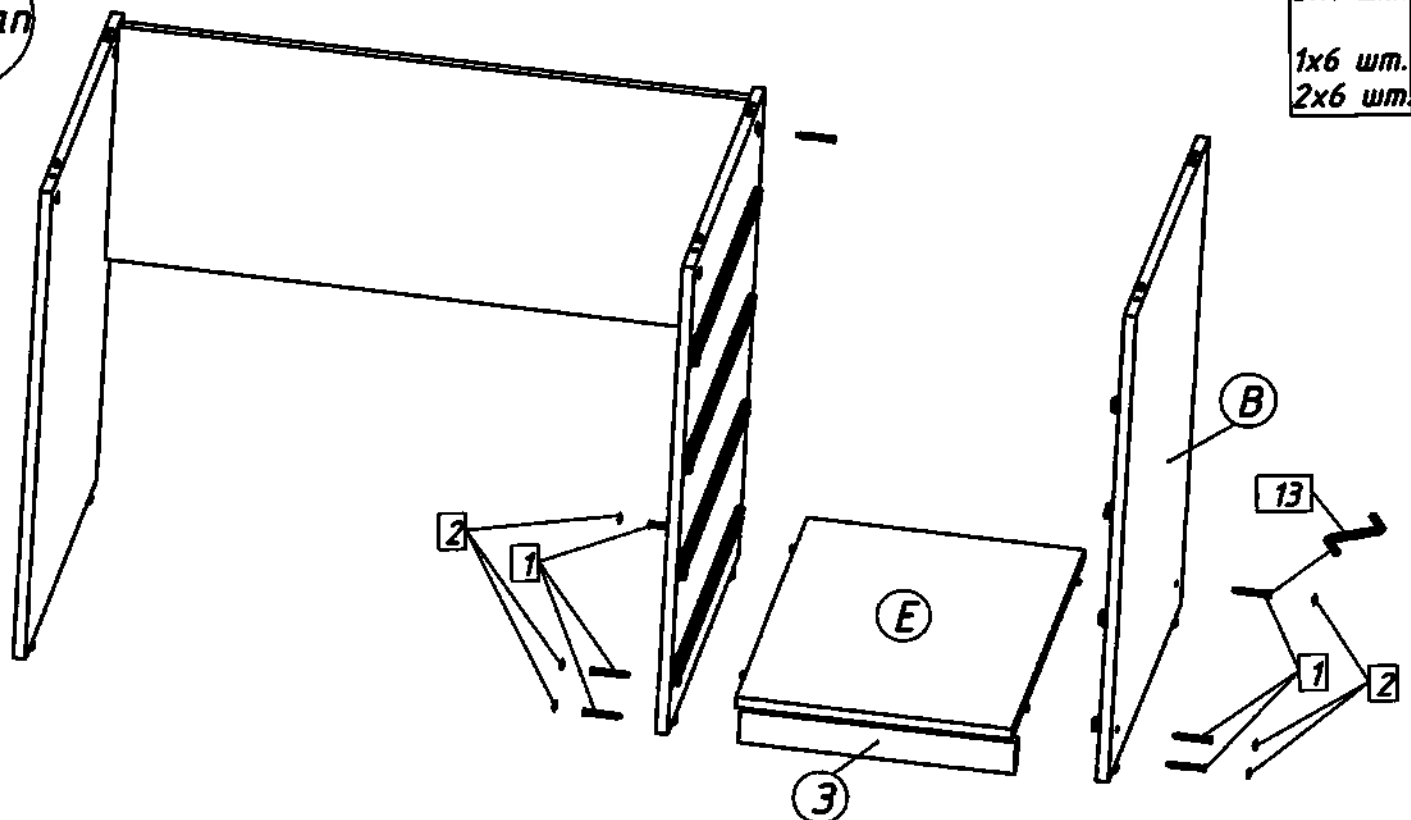


8 этап

Окрашенная сторона

Произведите установку стенки задней


Жх1 шт.
7х20 шт.

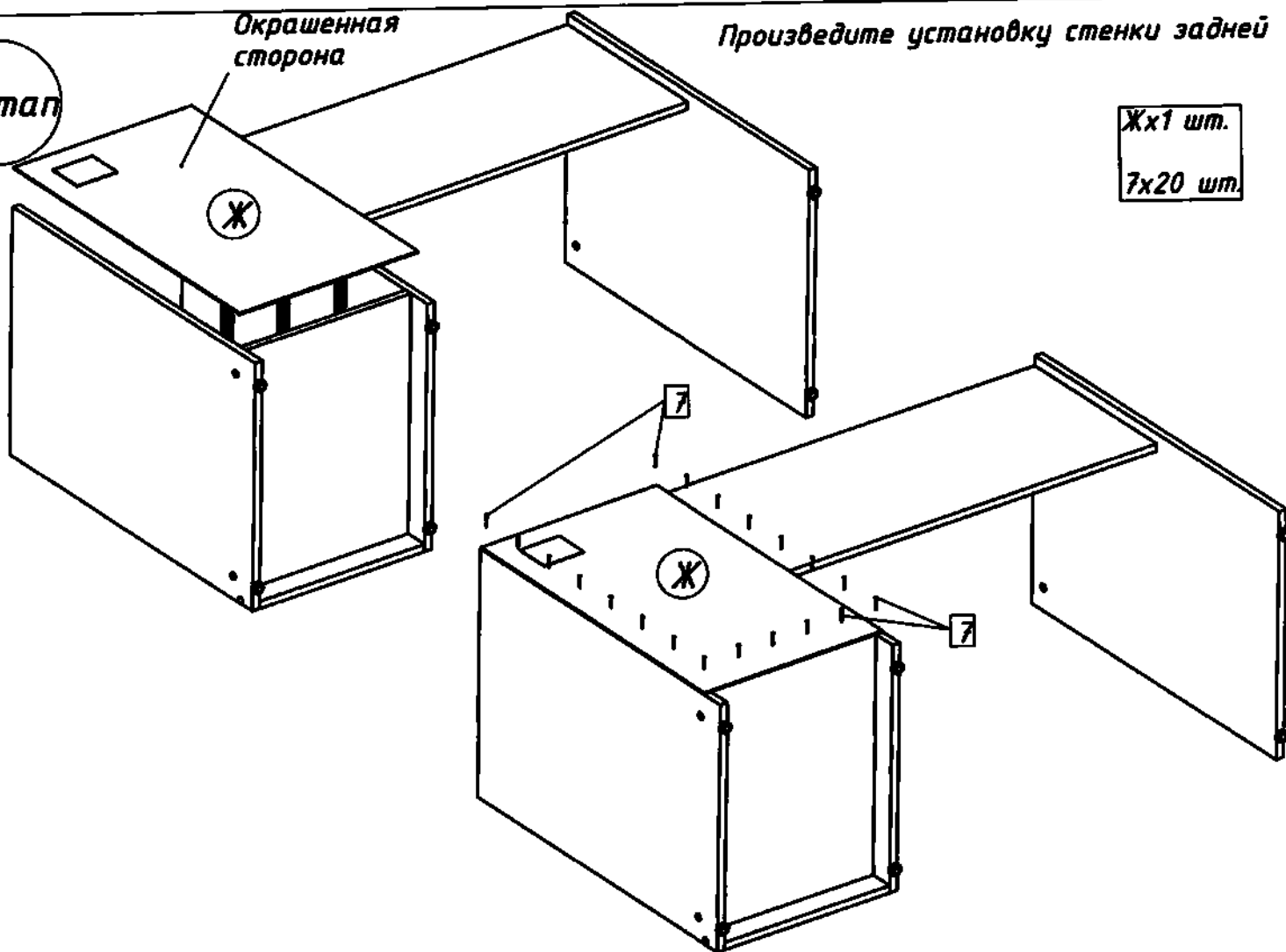

9 этап

Произведите сборку столешницы


Ax1 шт.
5x6 шт.

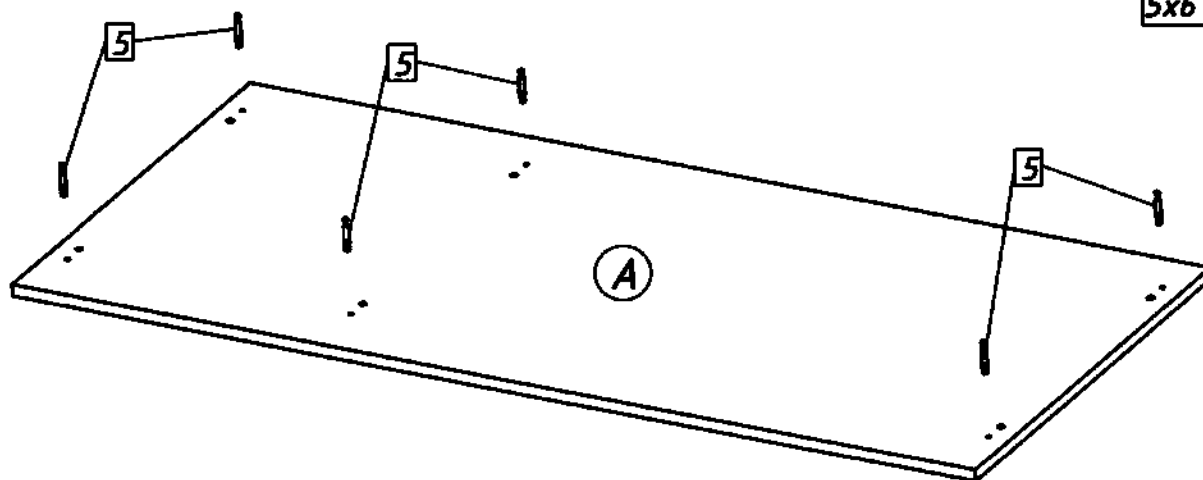

10 этап

Произведите установку столешницы


Ax1 шт.
6x6 шт.

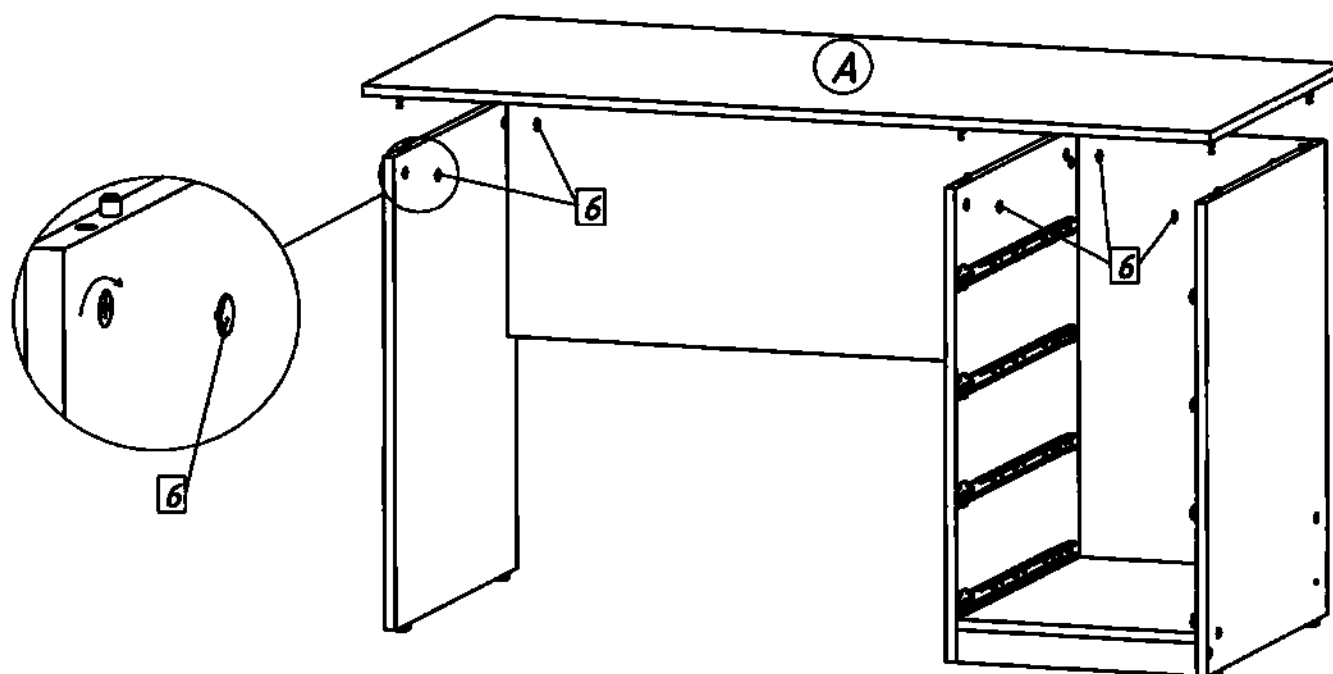

Установив столешницу, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке шесть эксцентриков [4]. После этого установите заглушки эксцентриков [6].


11 этап

Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков
Соберите каждые стенки К, Л, М в 4-х экземплярах

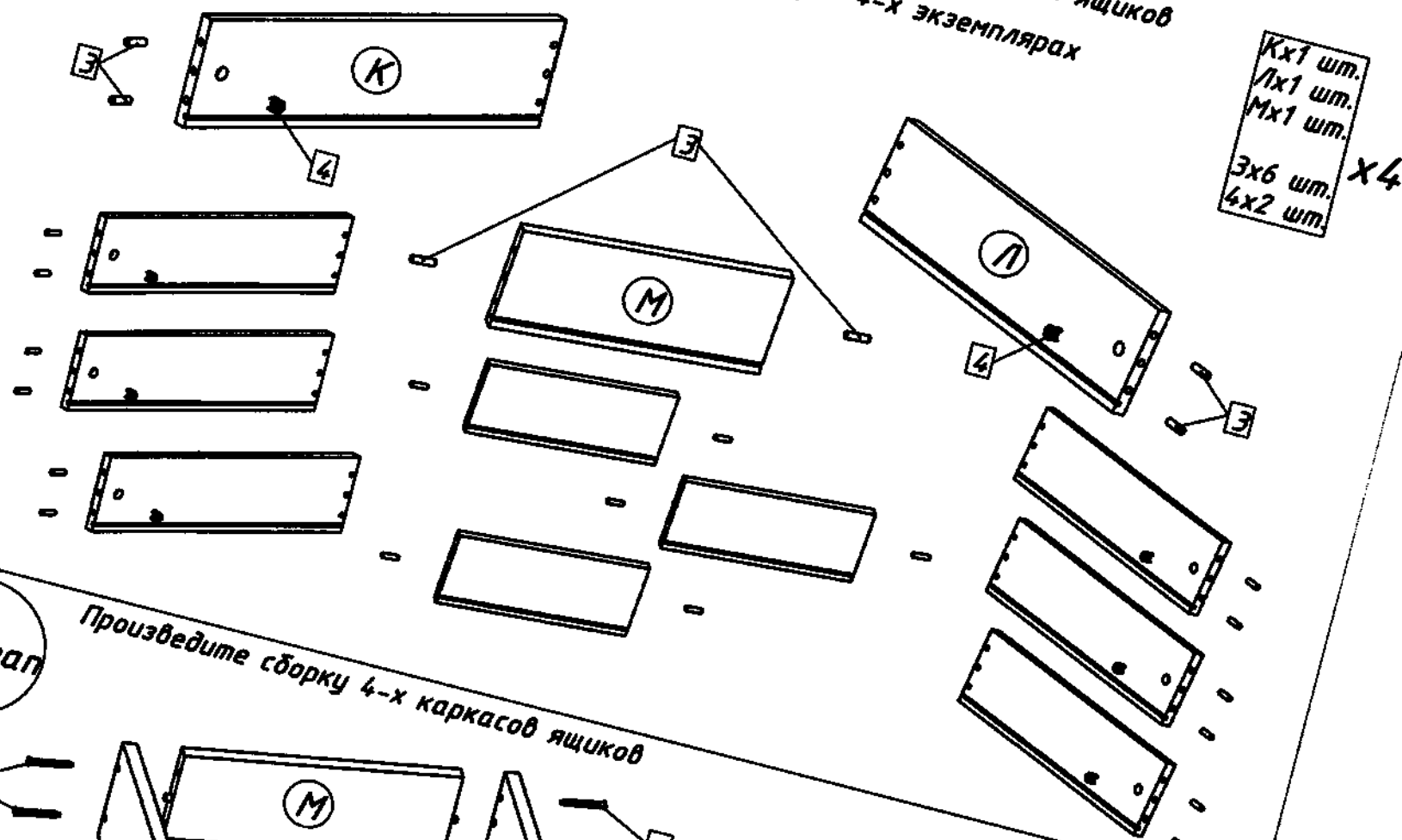


12 этап

Произведите сборку 4-х каркасов ящиков

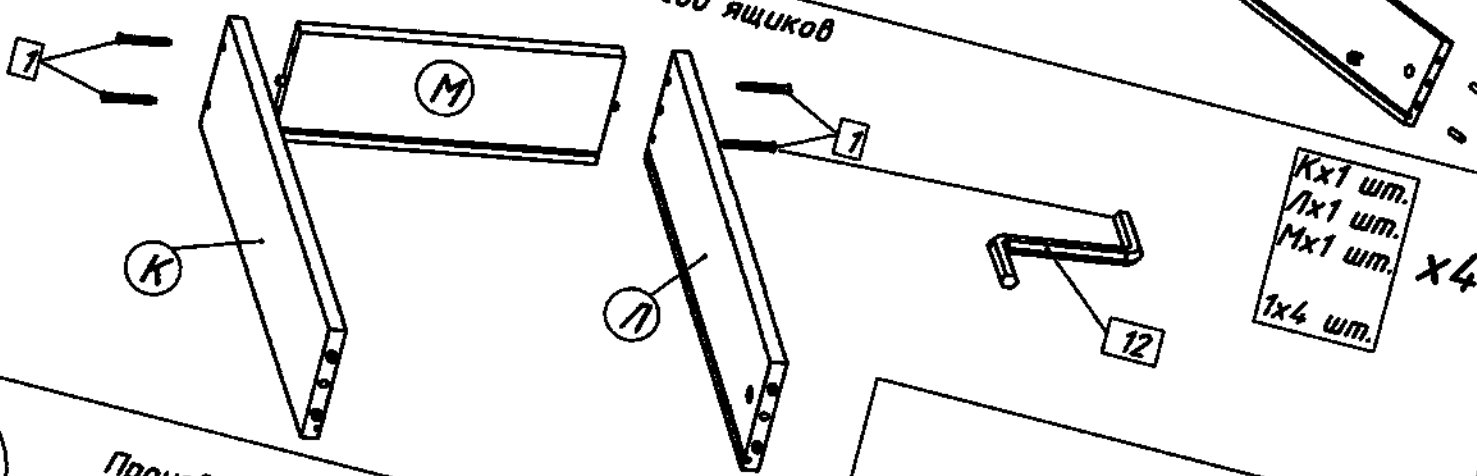

13 этап

Произведите установку дна для 4-х ящиков




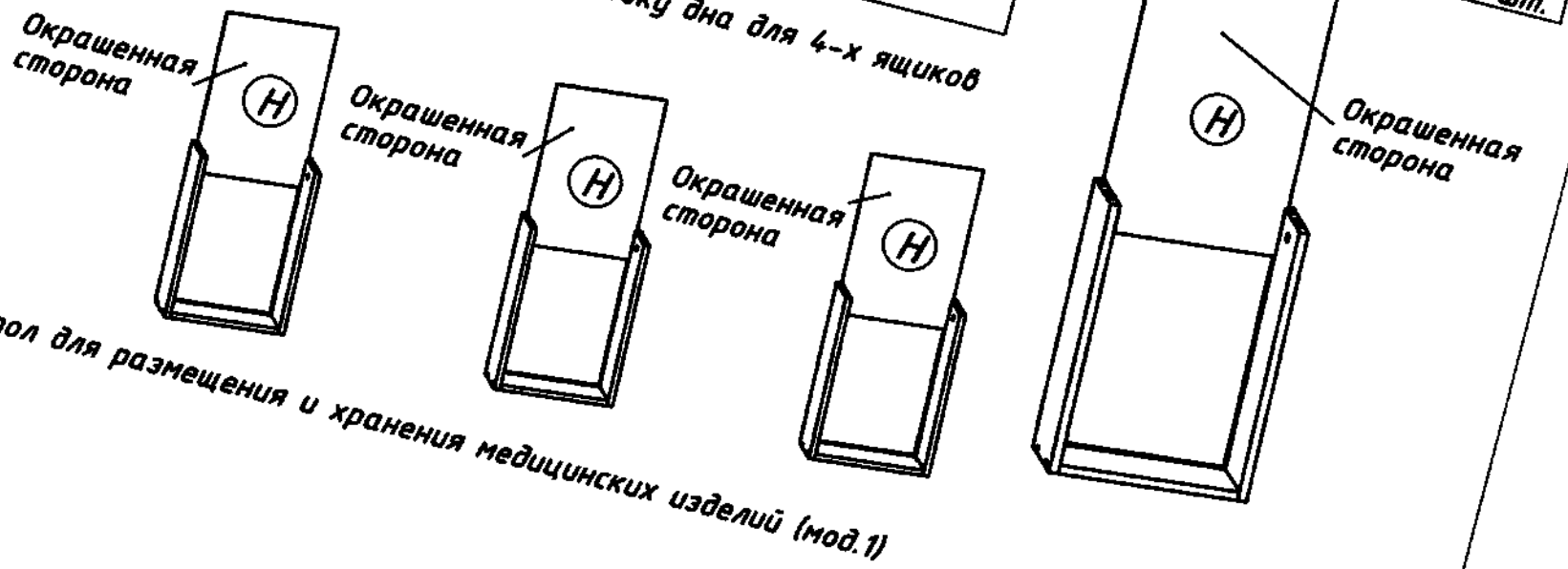


Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.1)

Произведите сборку 4-х фасадов ящиков

14 этап

10/1

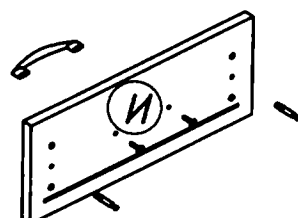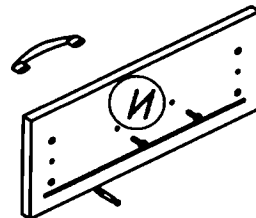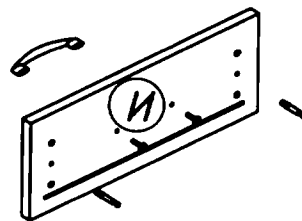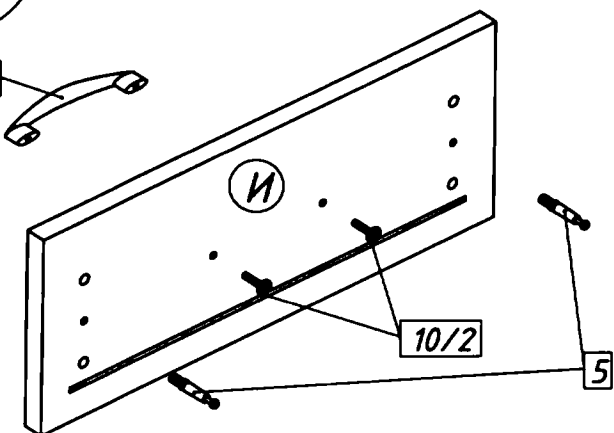

Их1 шт.

5x2 шт.
10/1x1 шт.
10/2x2 шт.

x4






15 этап

Произведите сборку 4-х ящиков

Схема фиксации фасада (И) и установки заглушек (6)

Соединив фасад (И) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (4)

для их фиксации. Затем установите заглушки (6)

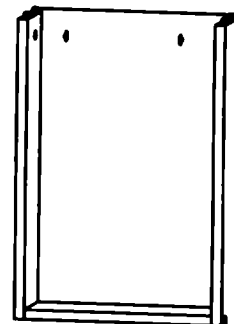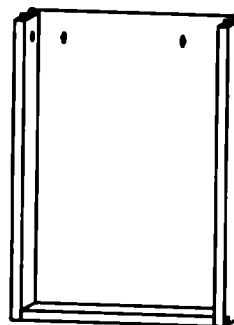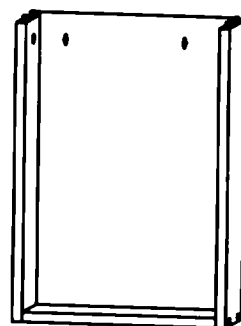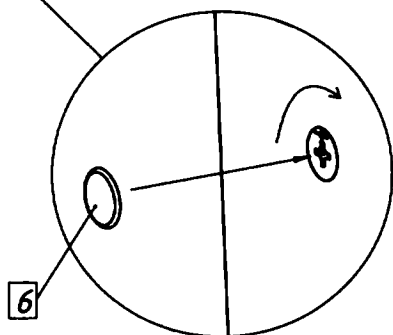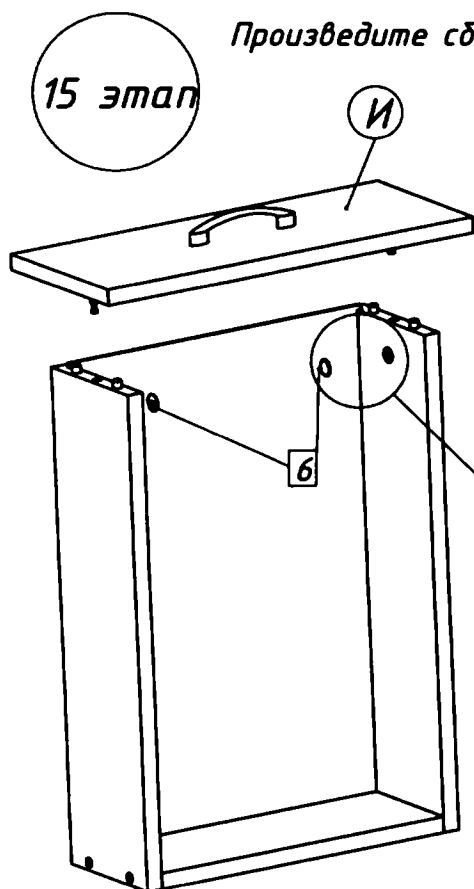

Их1 шт.

6x2 шт.

x4





16 этап

Произведите установку направляющих на 4 ящика

9

8/2




9

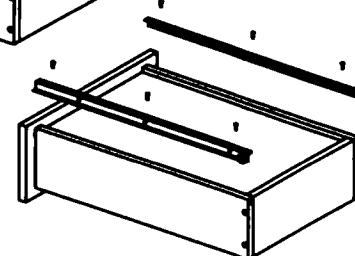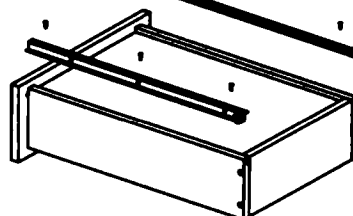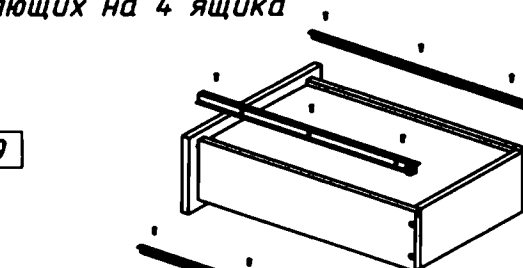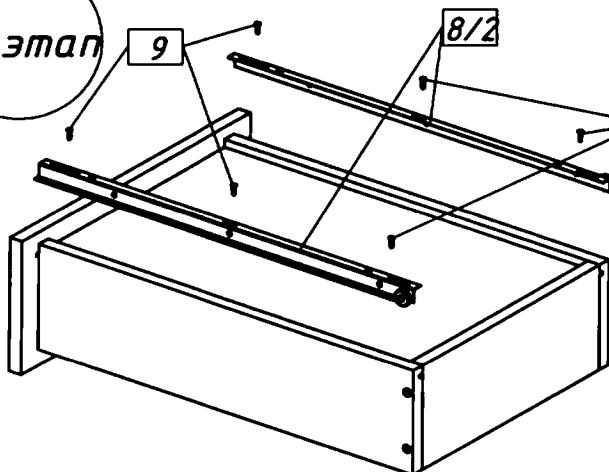

8/2x2 шт.
9x6 шт.

x4


17 этап

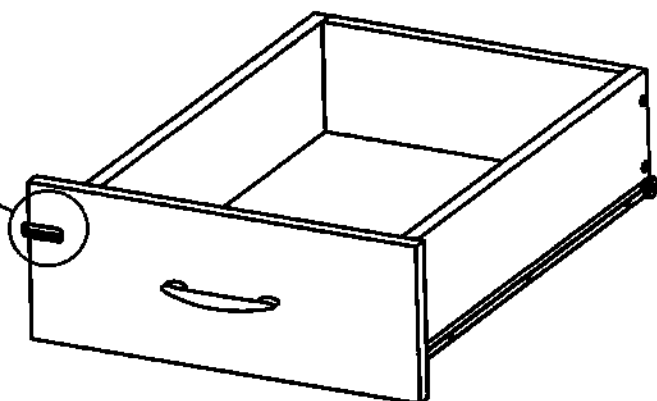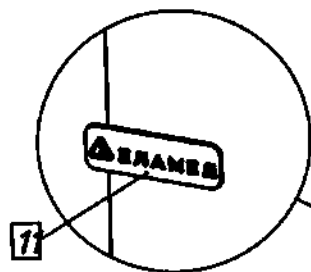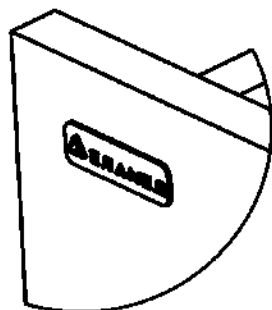


18 этап

Установите ящики


ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик
с наклеенным логотипом компании
должен быть установлен
в верхней части
встроенной тумбы

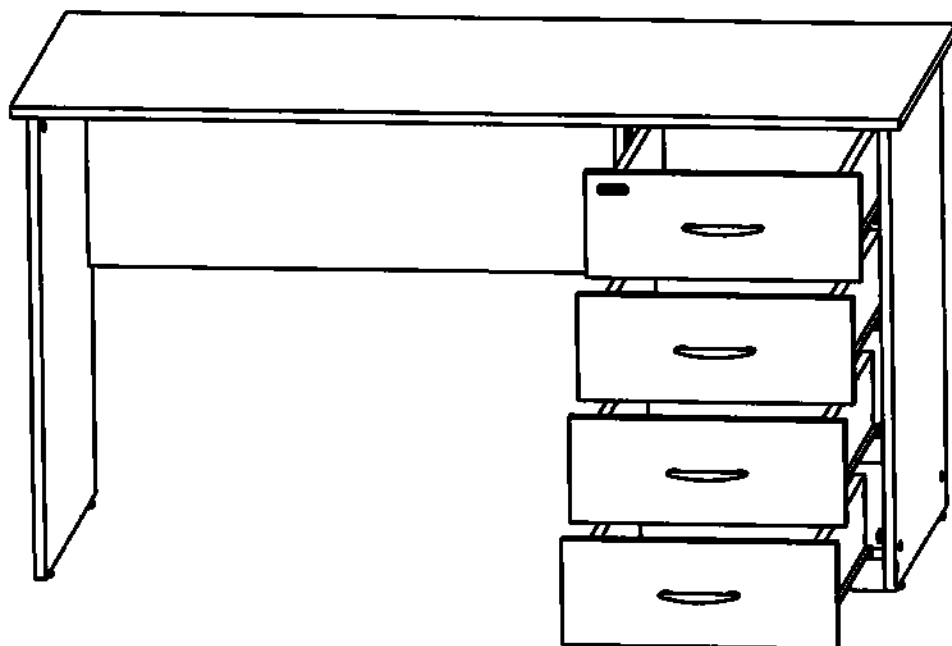

Сборка изделия завершена

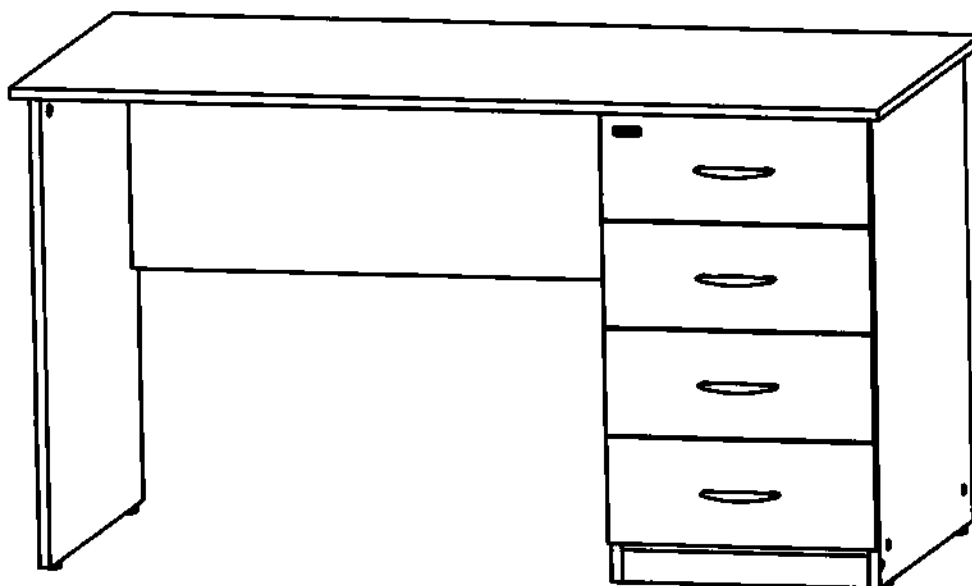

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942810.114 ТУ
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2)

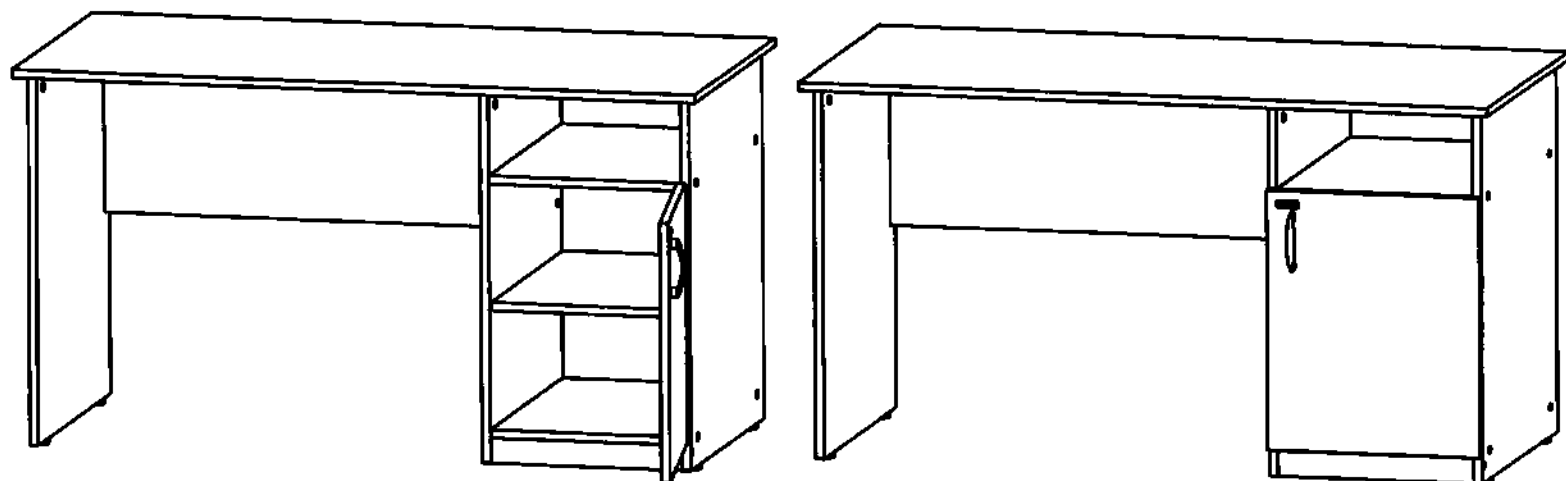


Основные обозначения:

1. А-К : детали
2. 1 - 14 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 13 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	1
Д	Стенка средняя	1
Е	Основание тумбы	1
Ж	Полка тумбы	1
З	Стенка задняя тумбы	1
И	Царга	1
К	Дверь	1
Л	Полка тумбы съёмная	1

Крепёж и фурнитура

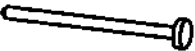Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	14	Конфирмат	
2	14	Заглушка конфирмата	
3	18	Шкант мебельный	
4	6	Эксцентрик	
5	6	Шток эксцентрика	
6	6	Заглушка эксцентрика	
7	20	Гвоздь 1,6x25	
8	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	8/1  8/2 
9	8	Саморез 4x16	
10	1 комплект	Ручка мебельная	10/1  10/2 
11	4	Полкодержатель	
12	1	Логотип компании	
13*	1	Ключ шестигранный	
14	6	Опора стола	

* Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранным **13** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления


Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

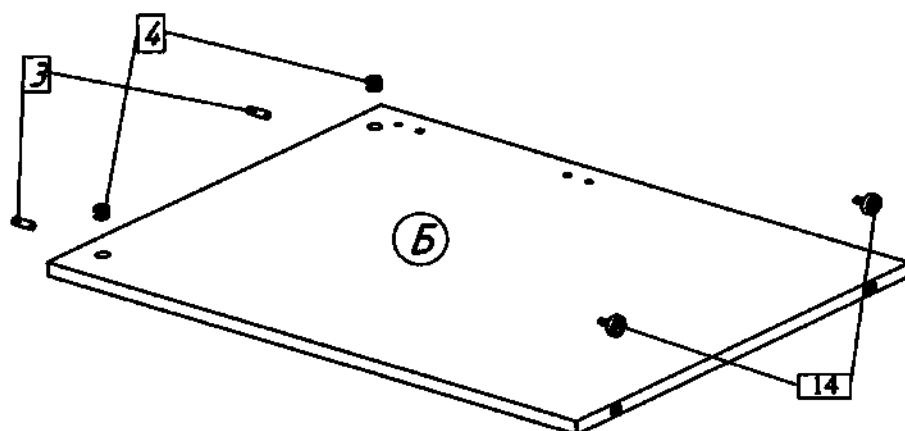

Бх1 шт.


3х2 шт.

4х2 шт.

14х2 шт.

2 этап

Произведите сборку стенки правой

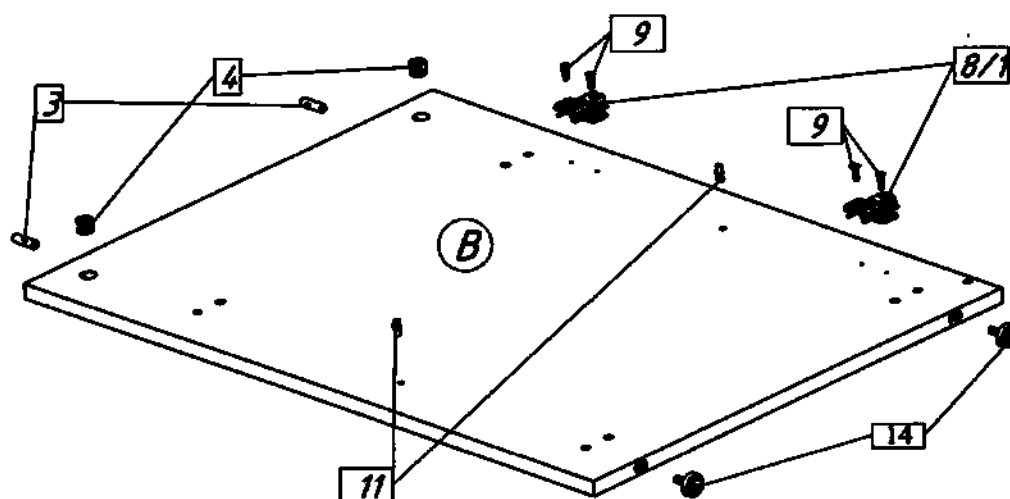

Бх1 шт.

3х2 шт.

4х2 шт.

8/1х2 шт.


9х4 шт.

11х2 шт.

14х2 шт.

3 этап

Произведите сборку стенки задней

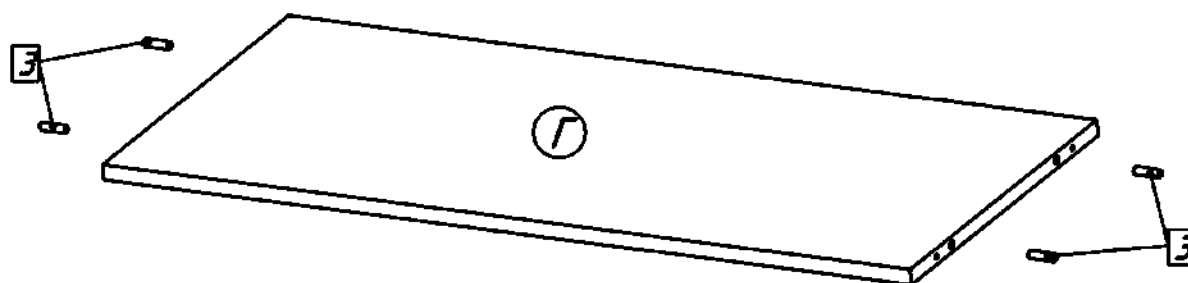


Гх1 шт.

3х4 шт.

Произведите сборку стенки средней

4 этап

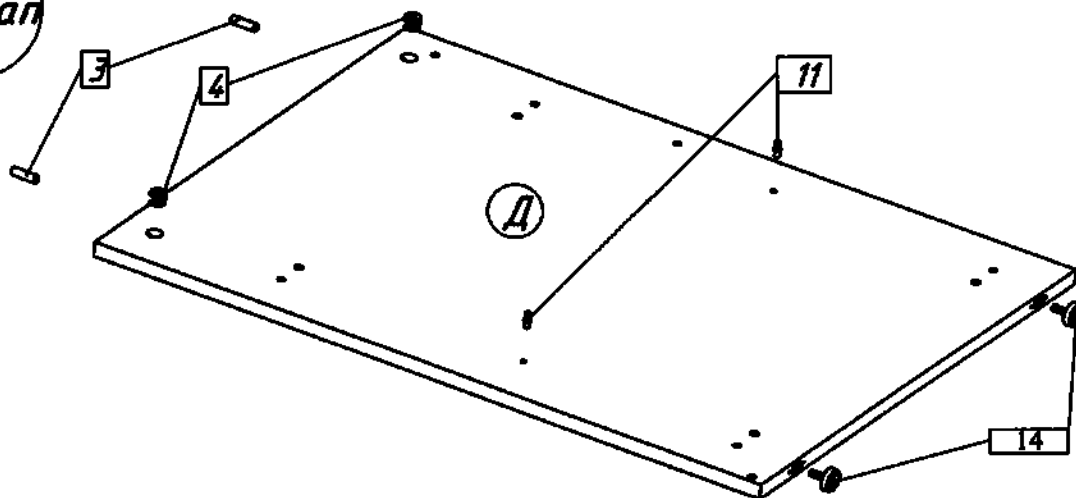

Дх1 шт.

3х2 шт.


4х2 шт.

11х2 шт.

14х2 шт.

5 этап

Произведите сборку основания и полки тумбы

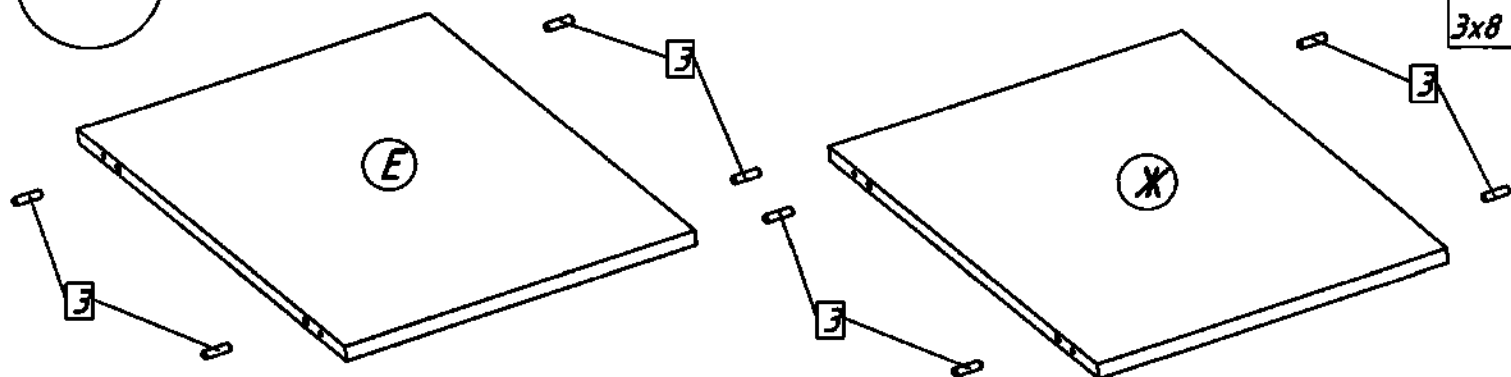


Ех1 шт.

Жх1 шт.

3х8 шт.

6 этап

Произведите сборку каркаса стола, соединив между собой стенку левую, стенку среднюю и стенку заднюю

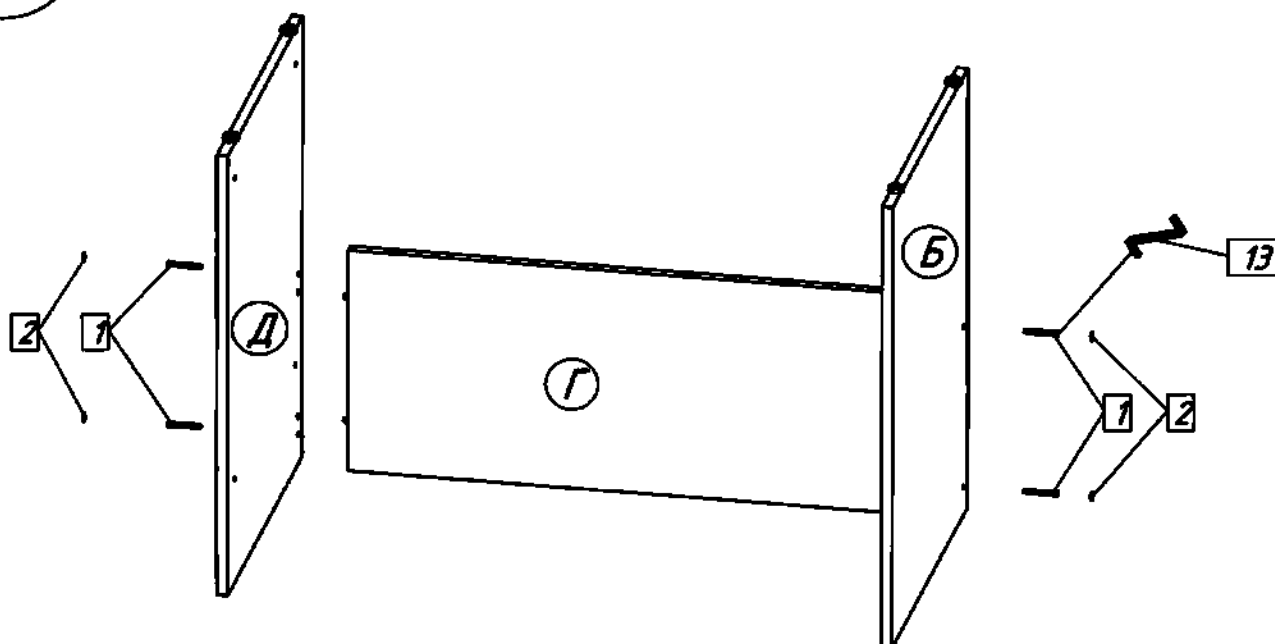

Бх1 шт.


Гх1 шт.

Дх1 шт.

1х4 шт.

2х4 шт.

7 этап

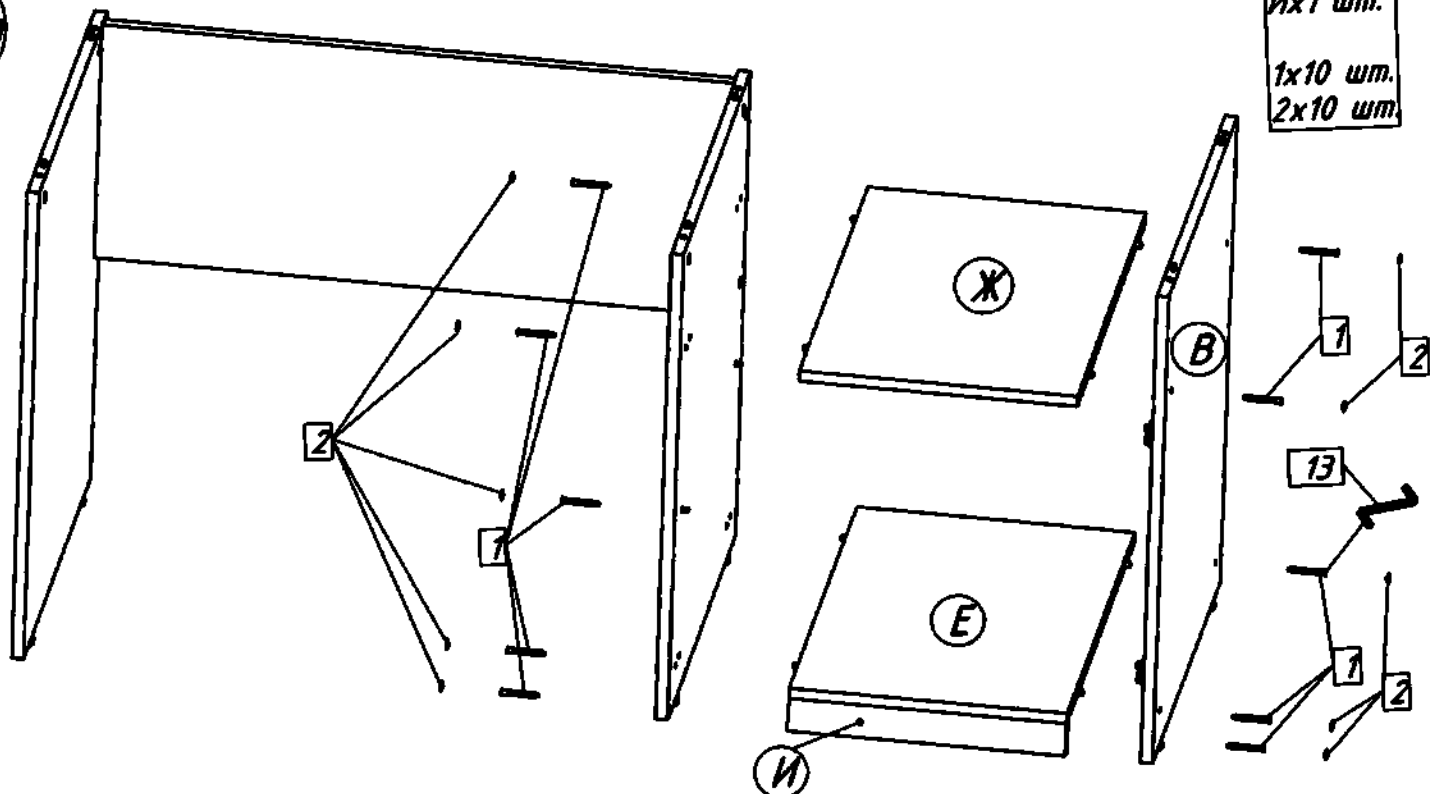


8 этап


Не окрашенная
сторона

Произведите установку стенки задней

3x1 шт.
7x20 шт.

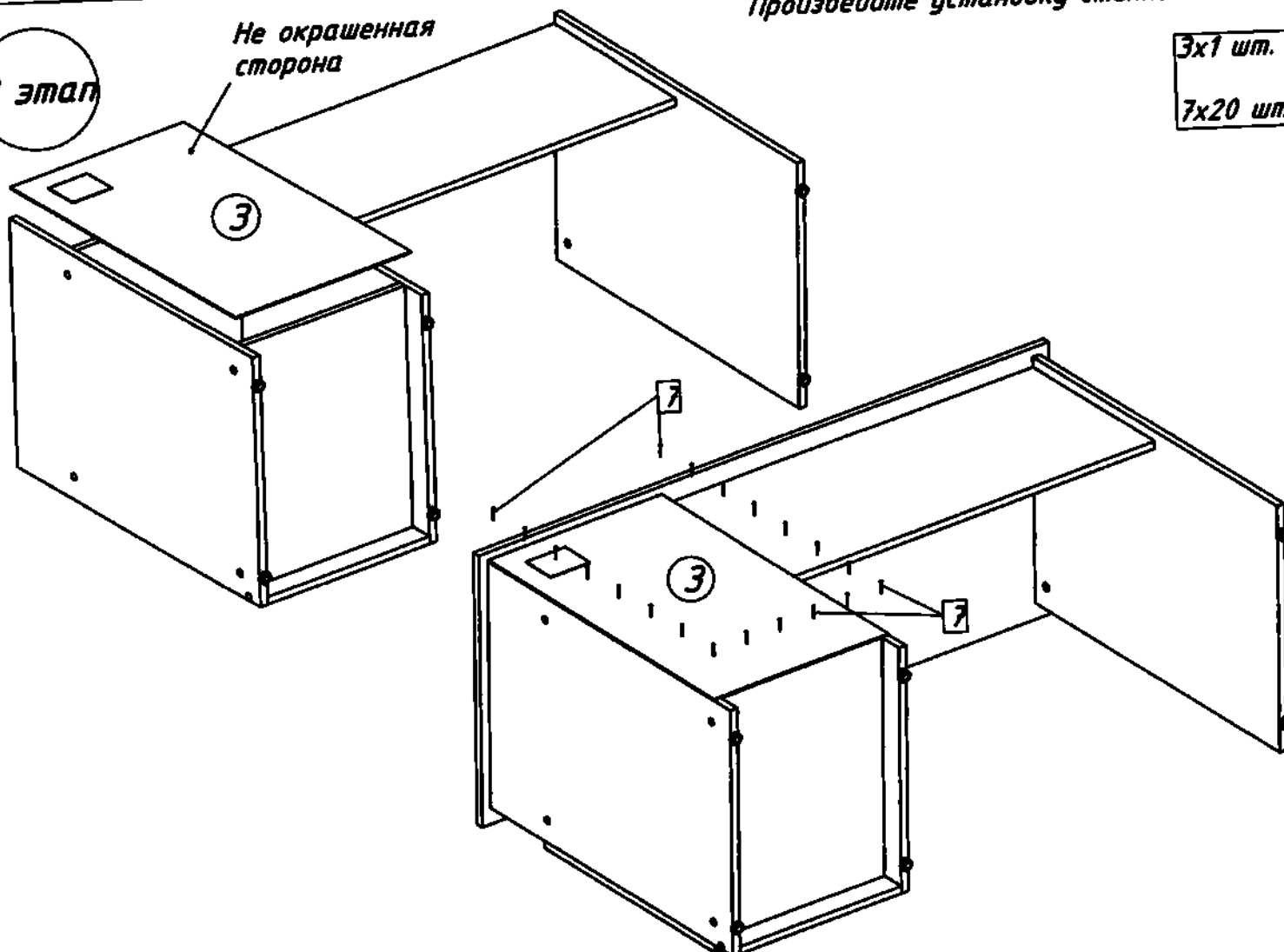


9 этап

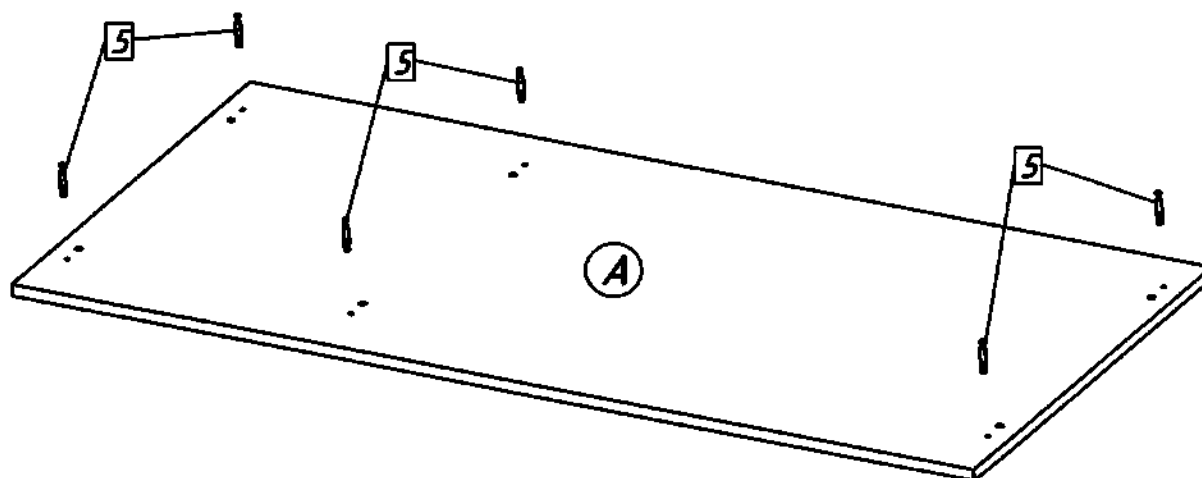

10 этап


Произведите установку столешницы

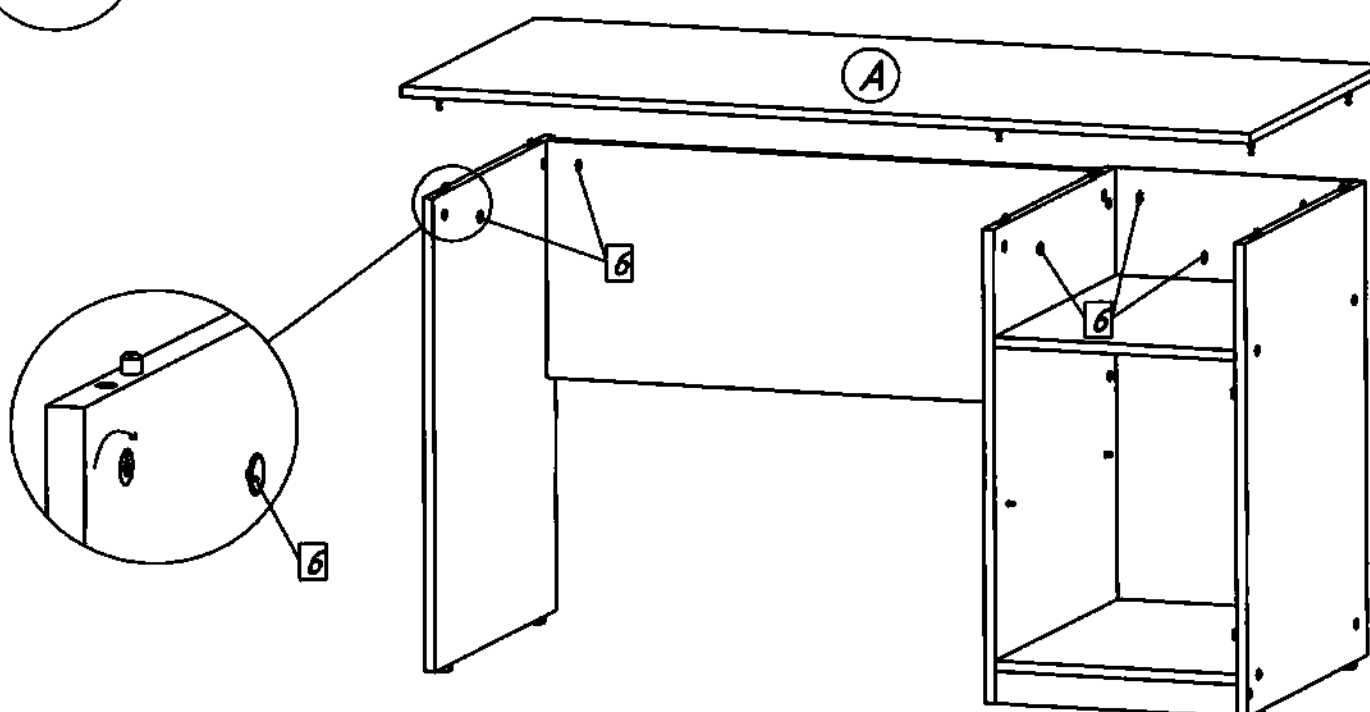

Установив столешницу, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке шесть эксцентриков [4]. После этого установите заглушки эксцентриков [6].


Произведите установку полки

11 этап

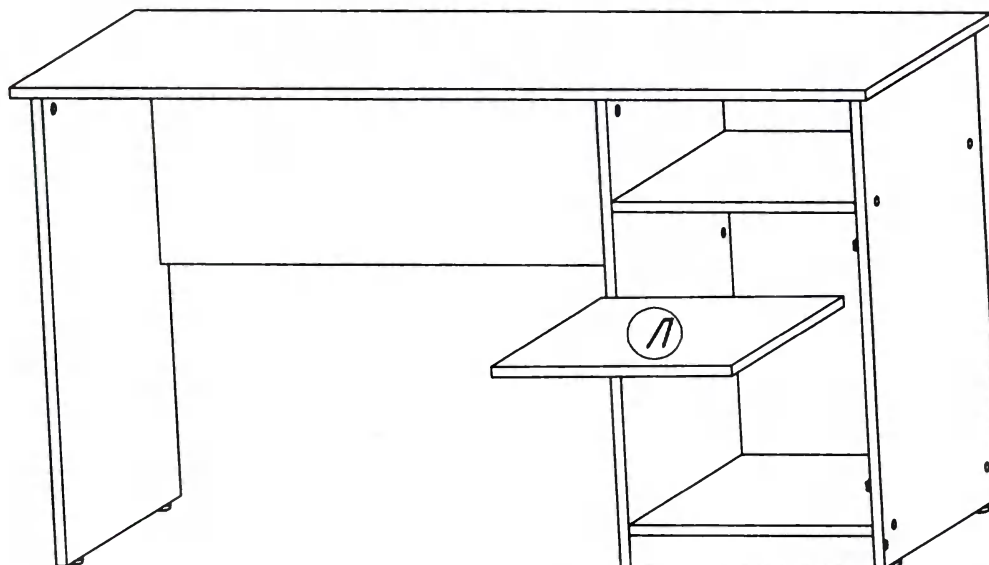

Произведите сборку двери

12 этап

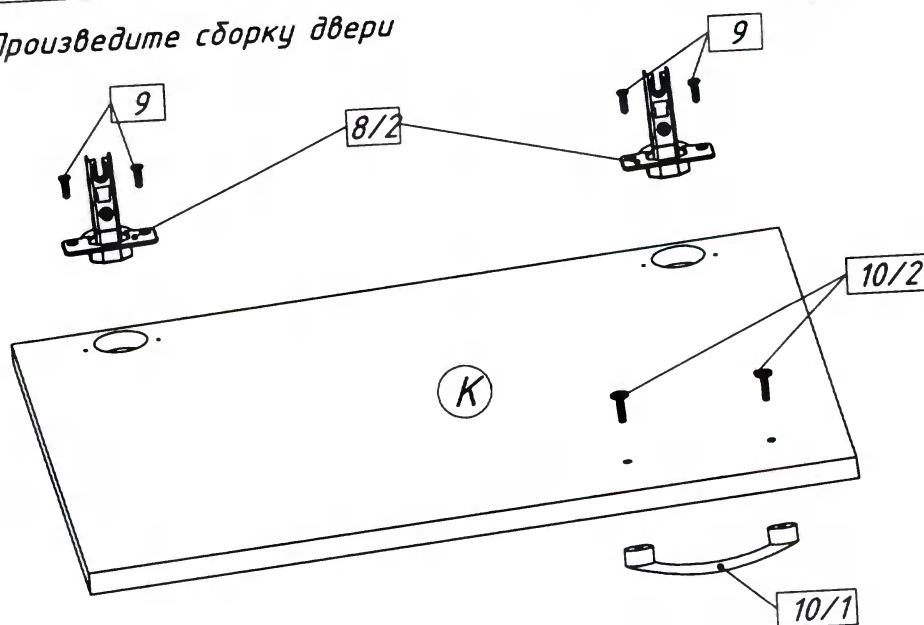


Кх1 шт.

8/2х2 шт.


9х4 шт.

10х1 компл.


Наклейте самоклеящийся логотип компании

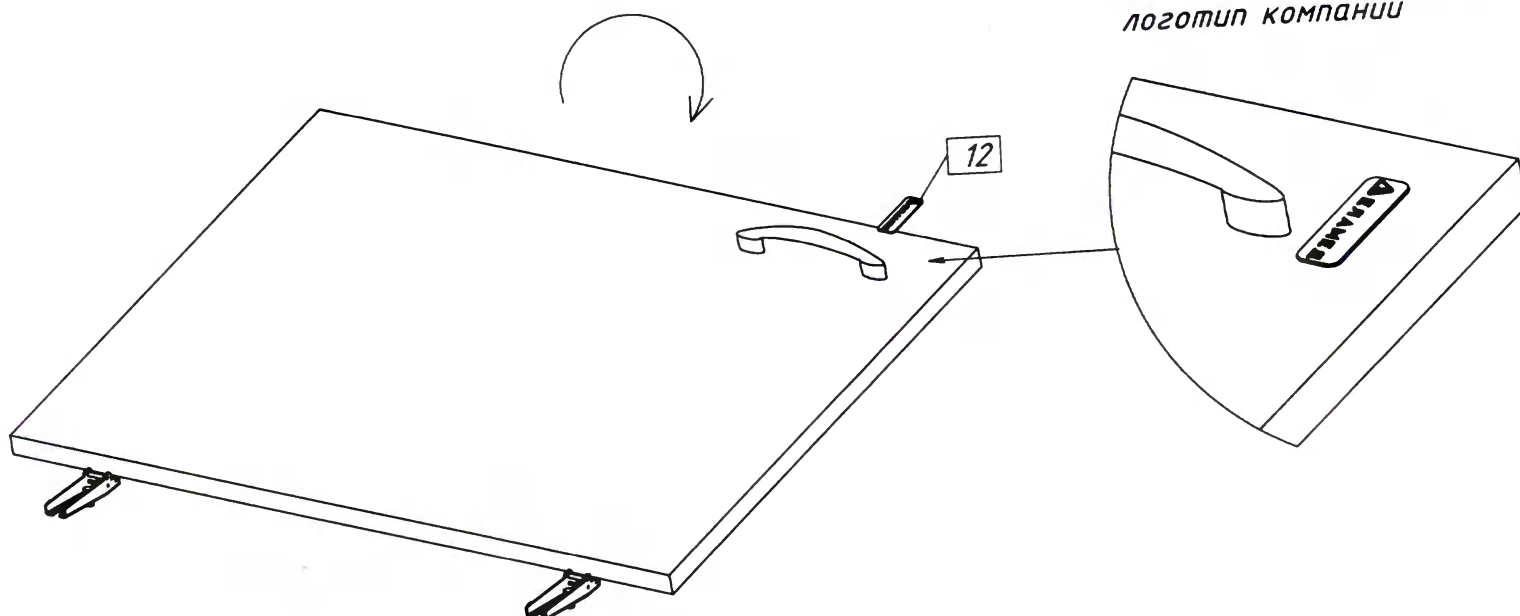


13 этап

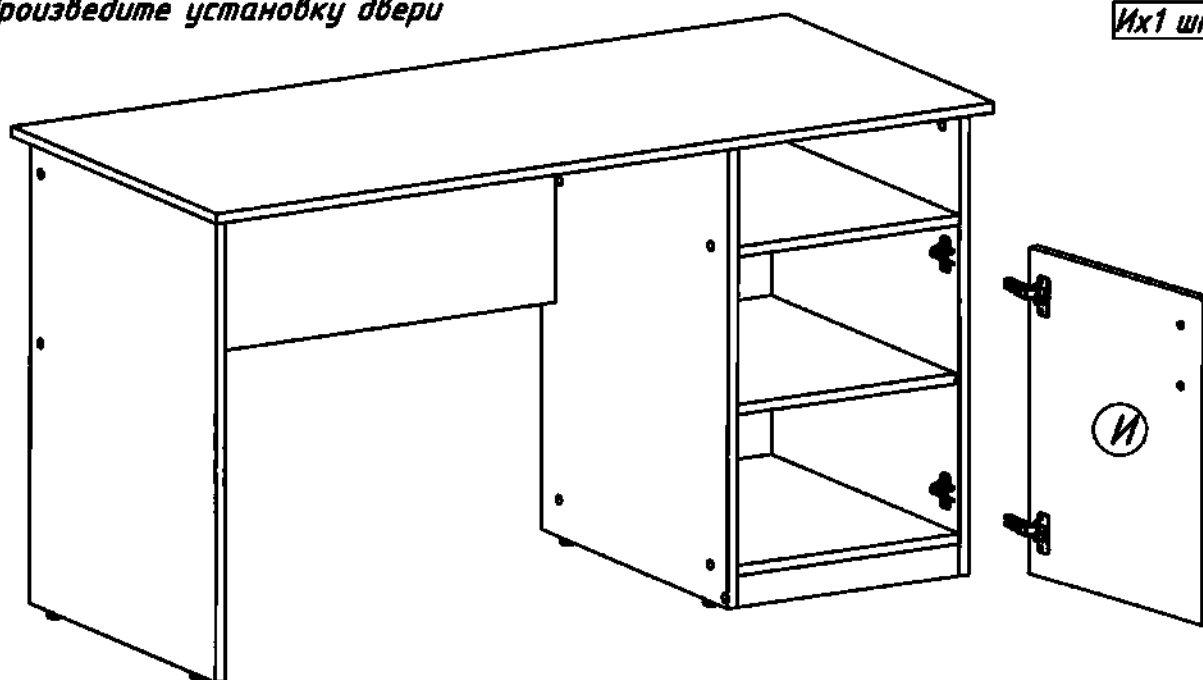


После установки двери
произведите регулировку
петель с затяжкой всех
винтов и саморезов

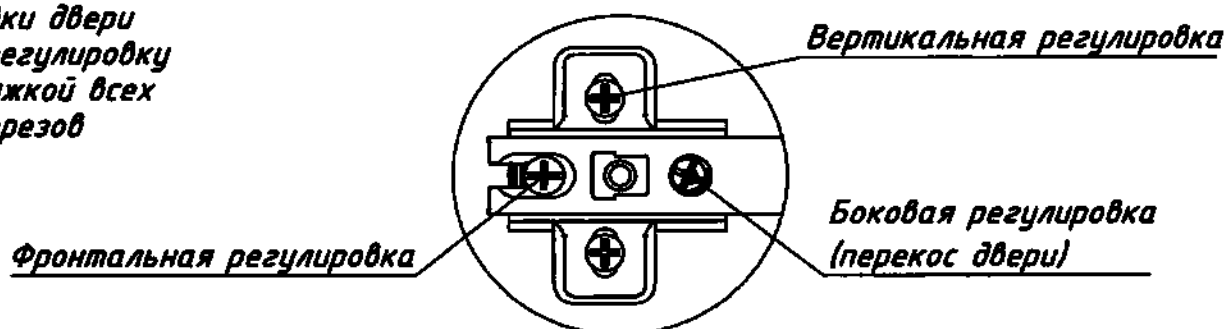

Сборка изделия завершена

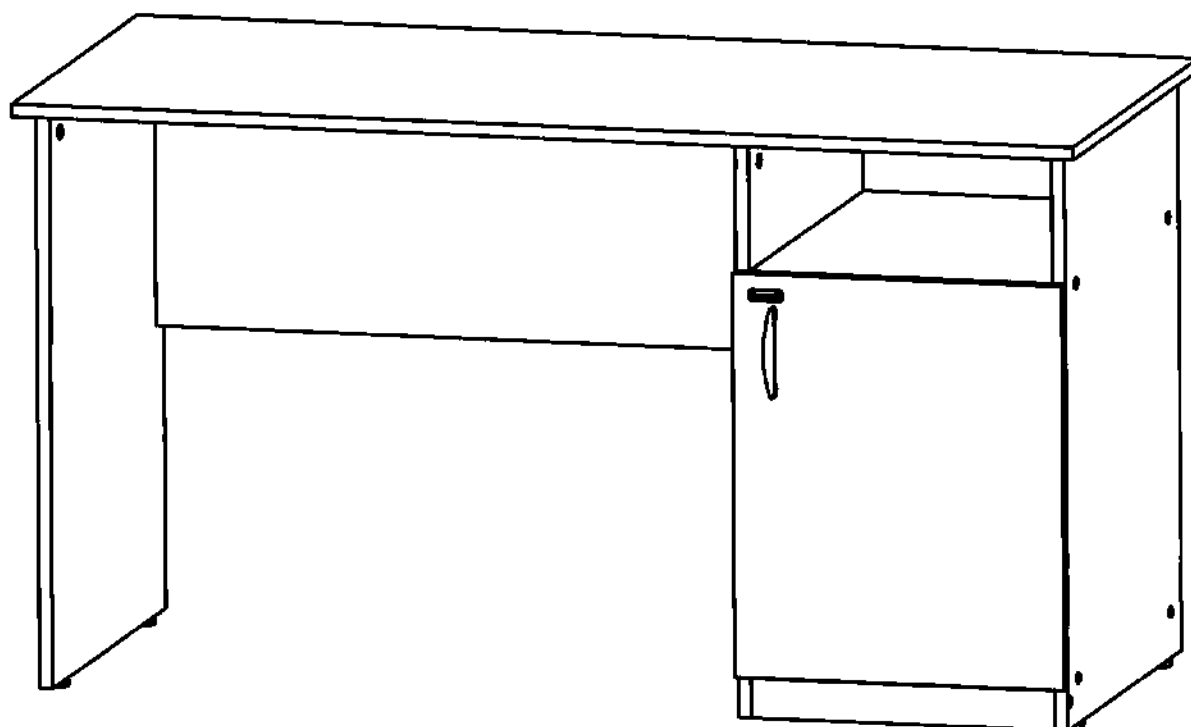

Инструкция по сборке изделия
Столы медицинские по ГИКС.942810.114 ТУ
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 3)

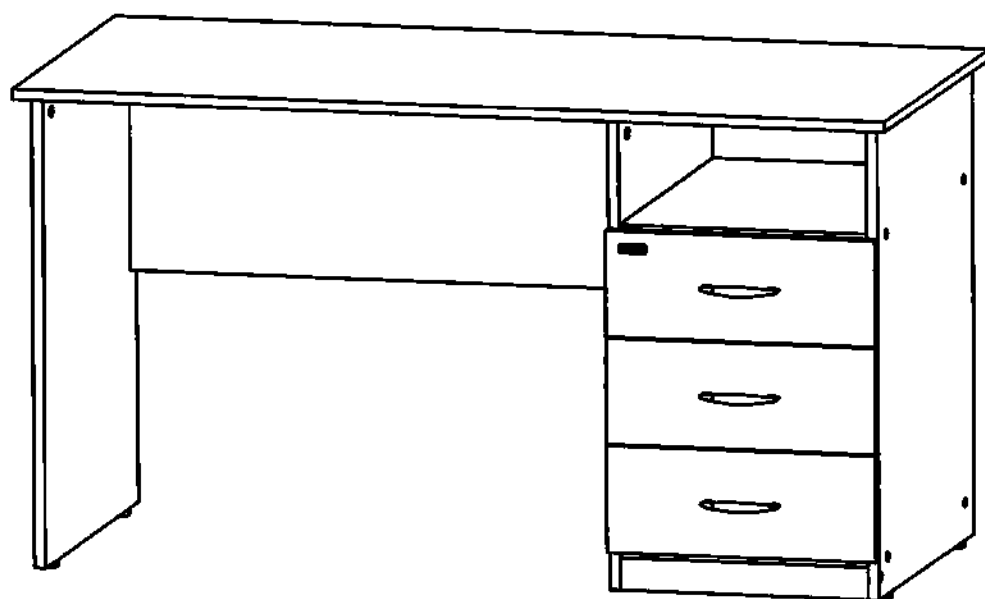


Условные обозначения:

1. А-О : детали
 2. 1 - 13 : крепёж и фурнитура
 3. 1 - 18 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	1
Д	Стенка средняя	1
Е	Основание тумбы	1
Ж	Полка тумбы	1
З	Стенка задняя тумбы	1
И	Царга	1
К	Фасад выдвижного ящика	3
Л	Стенка левая выдвижного ящика	3
М	Стенка правая выдвижного ящика	3
Н	Стенка задняя выдвижного ящика	3
О	Дно выдвижного ящика	3

Крепёж и фурнитура

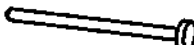Арт.	Кол - во	Обозначение		
1*	26	Конфирмат		
2	14	Заглушка конфирмата		
3	36	Шкант мебельный		
4	12	Эксцентрик		
5	12	Шток эксцентрика		
6	12	Заглушка эксцентрика		
7	20	Гвоздь 1,6х25		
8	3 комплекта	Направляющие	 9/1	 9/2
9	36	Саморез 3,5х13		
10	3 комплекта	Ручка мебельная	 11/1	 11/2
11	1	Логотип компании		
12*	1	Ключ шестигранный		
13	6	Опора стола		

* Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранным **12** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

Бх1 шт.


3х2 шт.

4х2 шт.

13х2 шт.


1 этап

Произведите сборку стенки левой

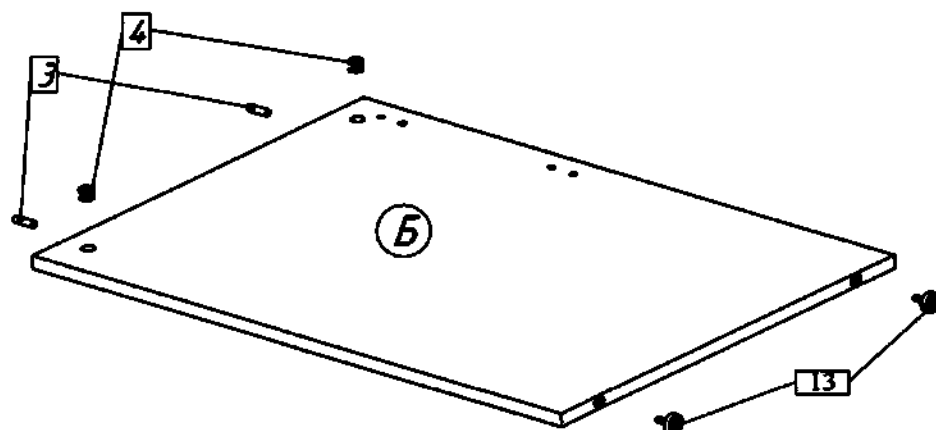Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

2 этап

Произведите сборку стенки правой

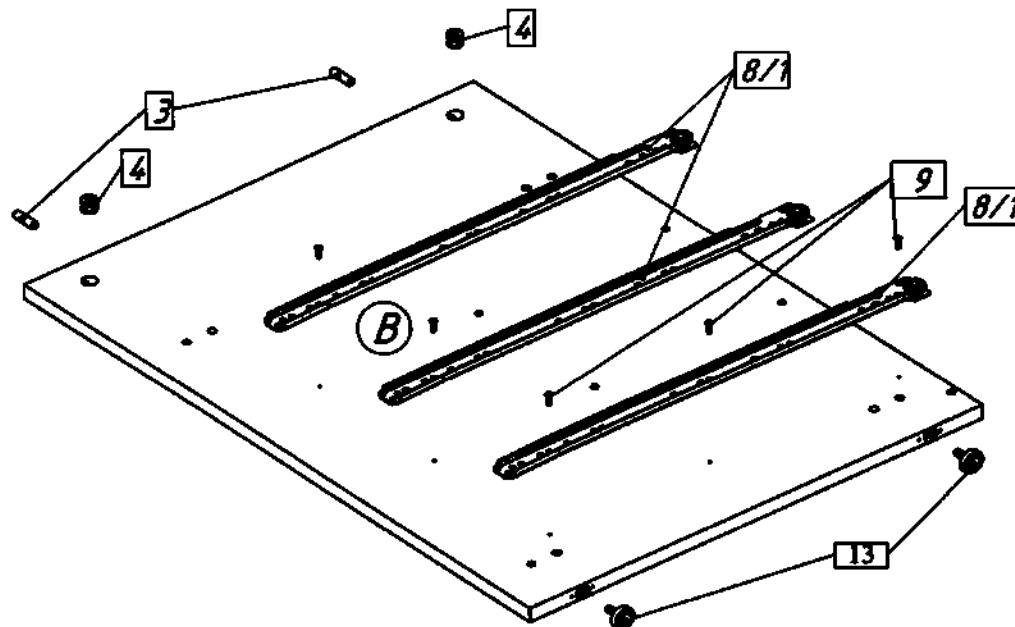

Вх1 шт.

3х2 шт.

4х2 шт.


8/1х3 шт.

9х9 шт.

13х2 шт.

3 этап


Произведите сборку стенки задней

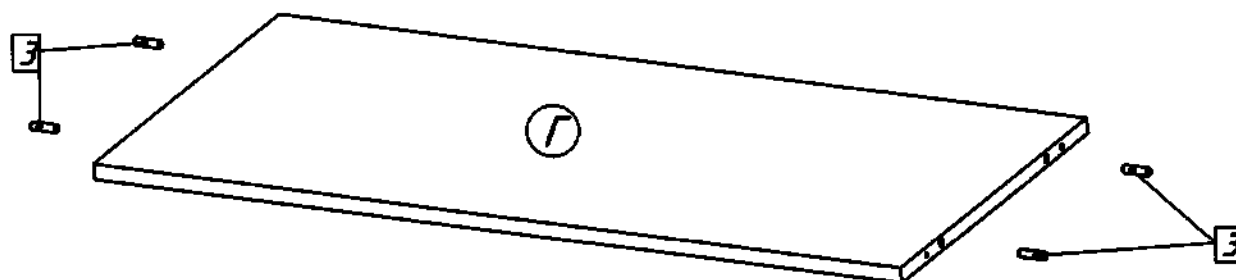

Гх1 шт.

3х4 шт.

4 этап

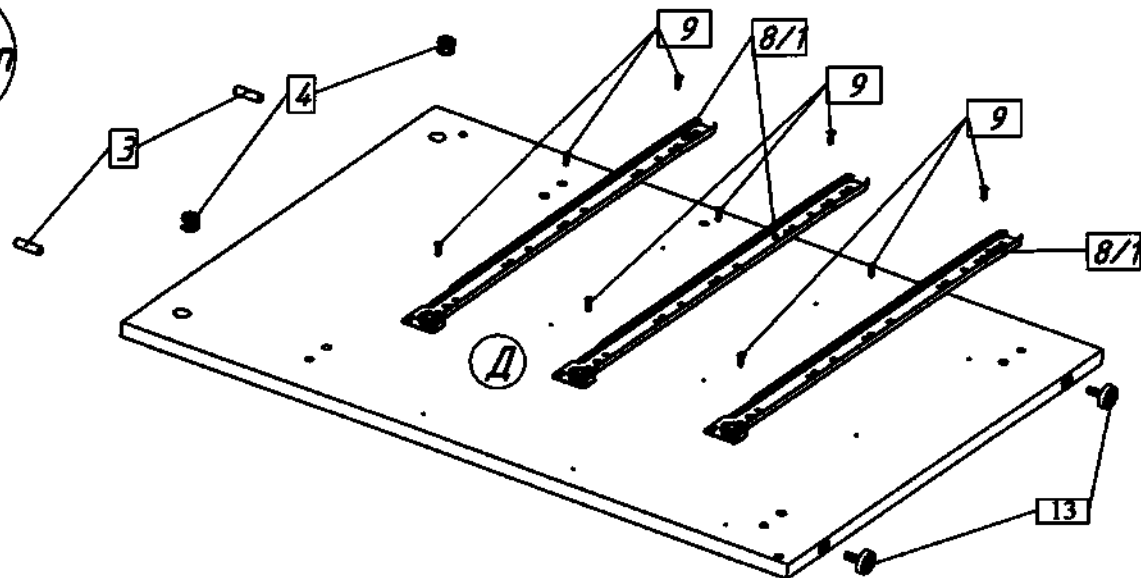

Дх1 шт.

3х2 шт.

4х2 шт.


8/1х3 шт.

9х9 шт.

13х2 шт.

5 этап

Произведите сборку основания и полки тумбы

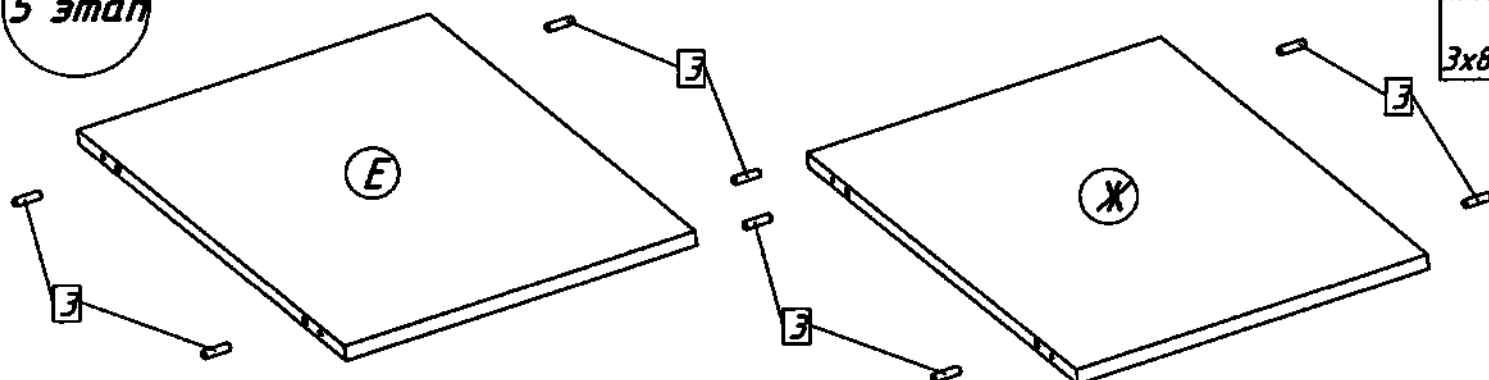


Ех1

Жх1 шт.

3х8 шт.

6 этап

Произведите сборку каркаса стола, соединив между собой стенку левую, стенку среднюю и стенку заднюю

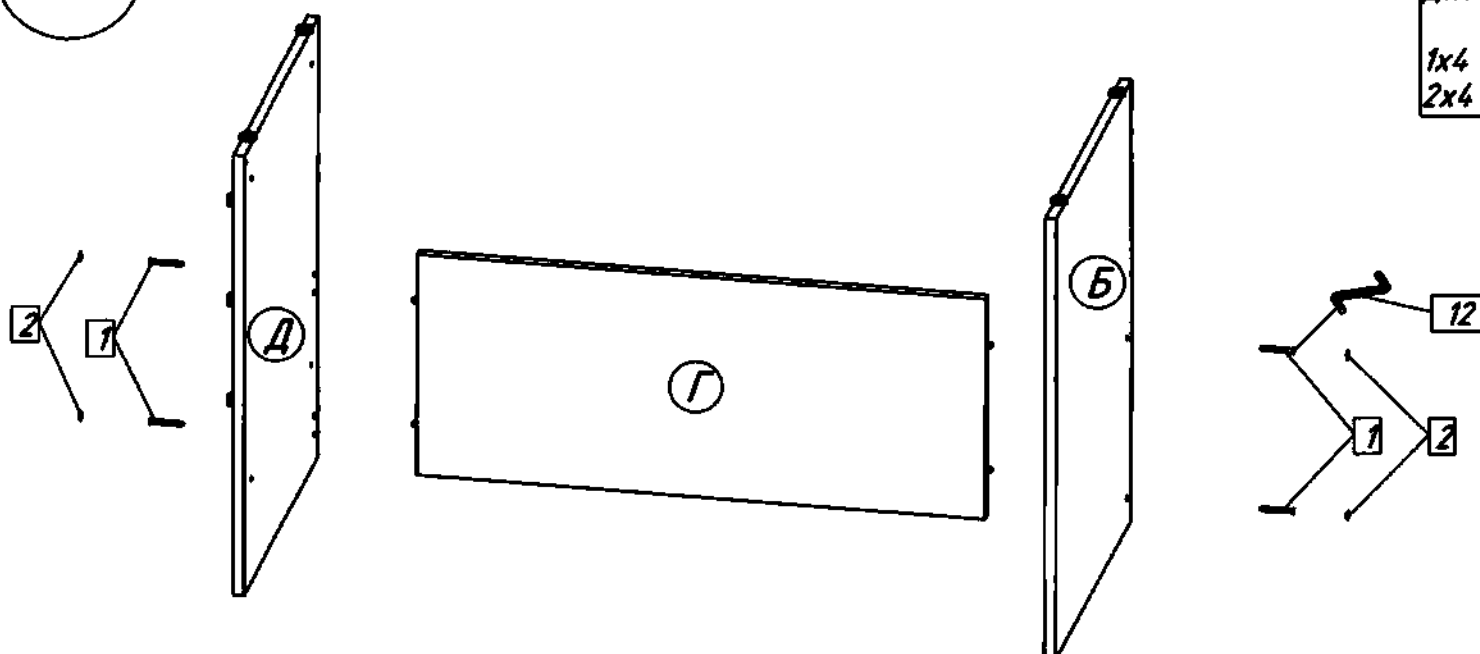

Бх1 шт.

Гх1 шт.

Дх1 шт.


1х4 шт.

2х4 шт.

ОМ 29.757.01

7 этап

Закончите сборку каркаса стола

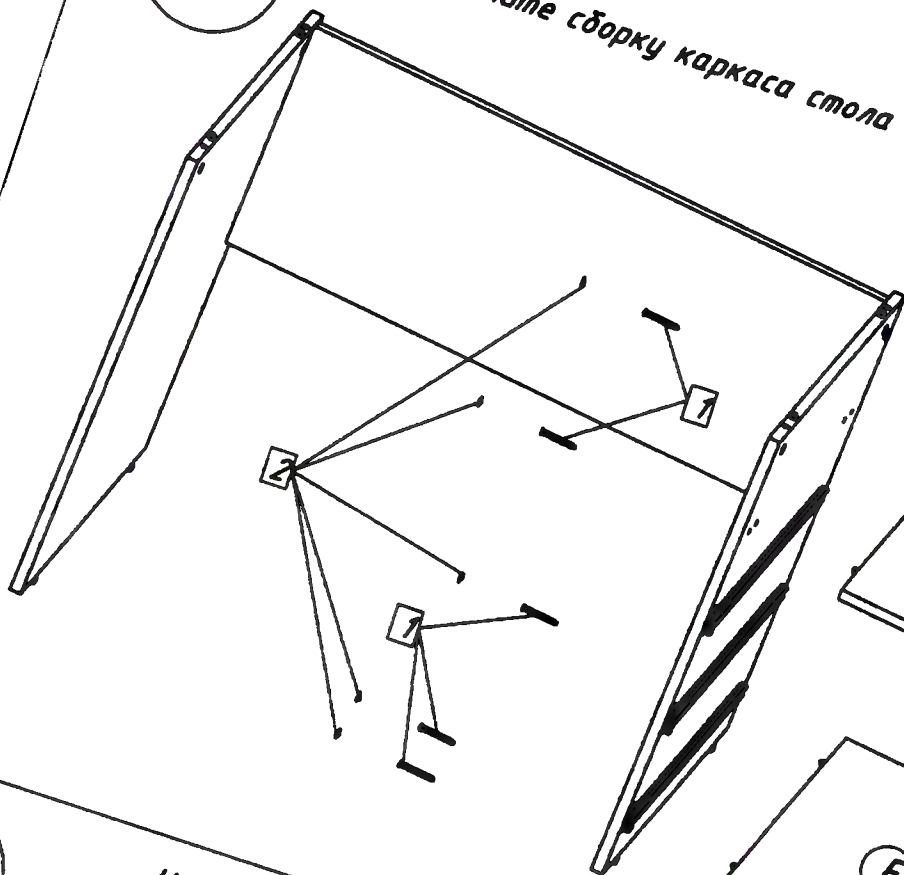


8x1 шт.
6x1 шт.
4x1 шт.
1x1 шт.
1x10 шт.
2x10 шт.

8 этап

Не окрашенная
сторона

Произведите установку стенки задней

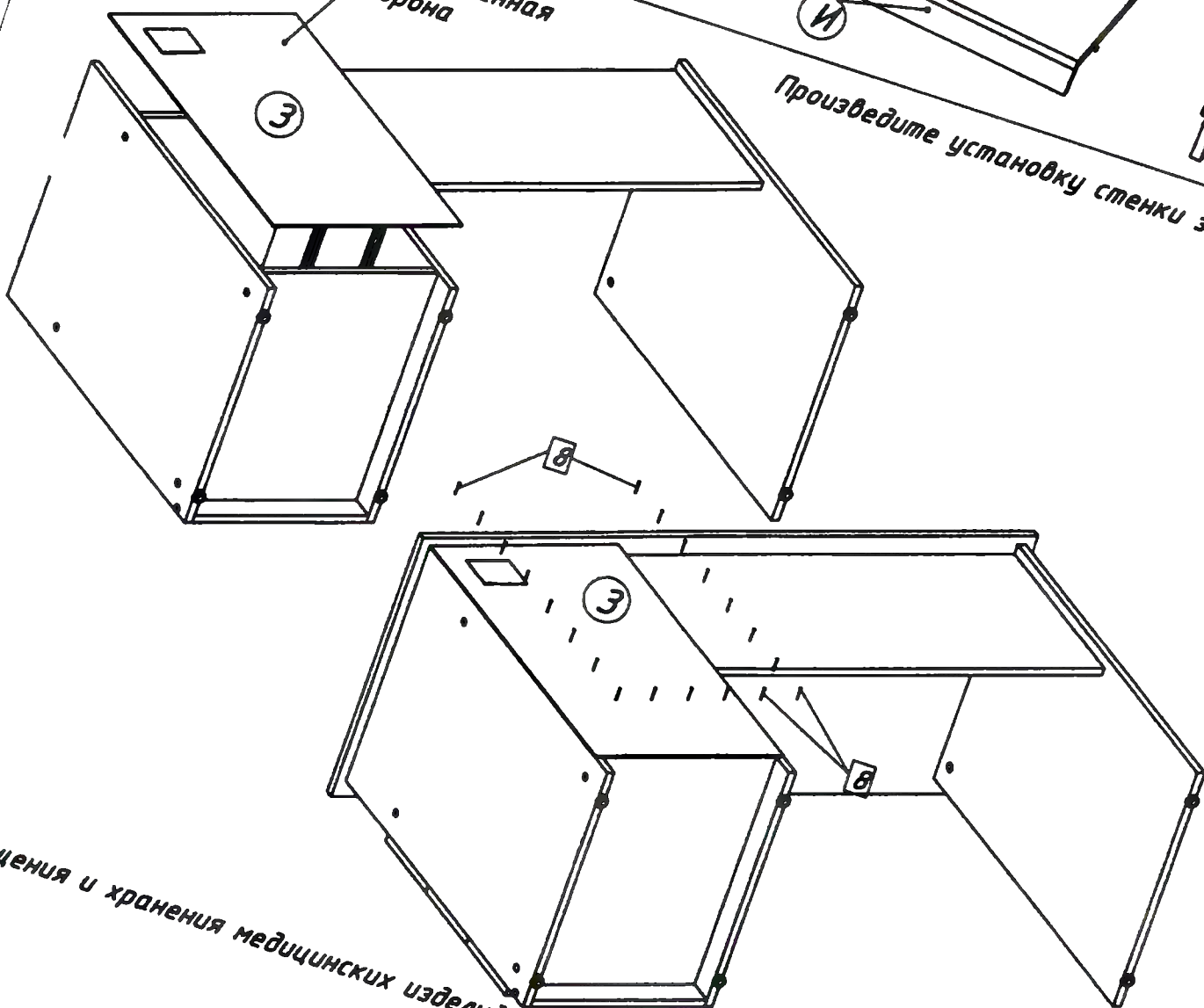


3x1 шт.
7x20 шт.

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 3)

9 этап

Ах1 шт.

5х6 шт.

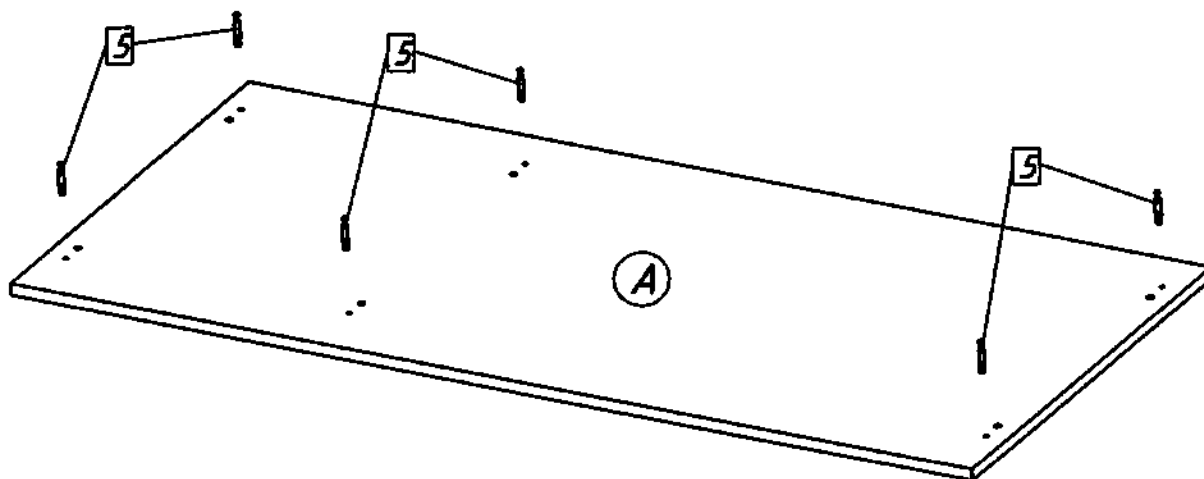


10 этап

Произведите установку столешницы

Ах1 шт.

6х6 шт.

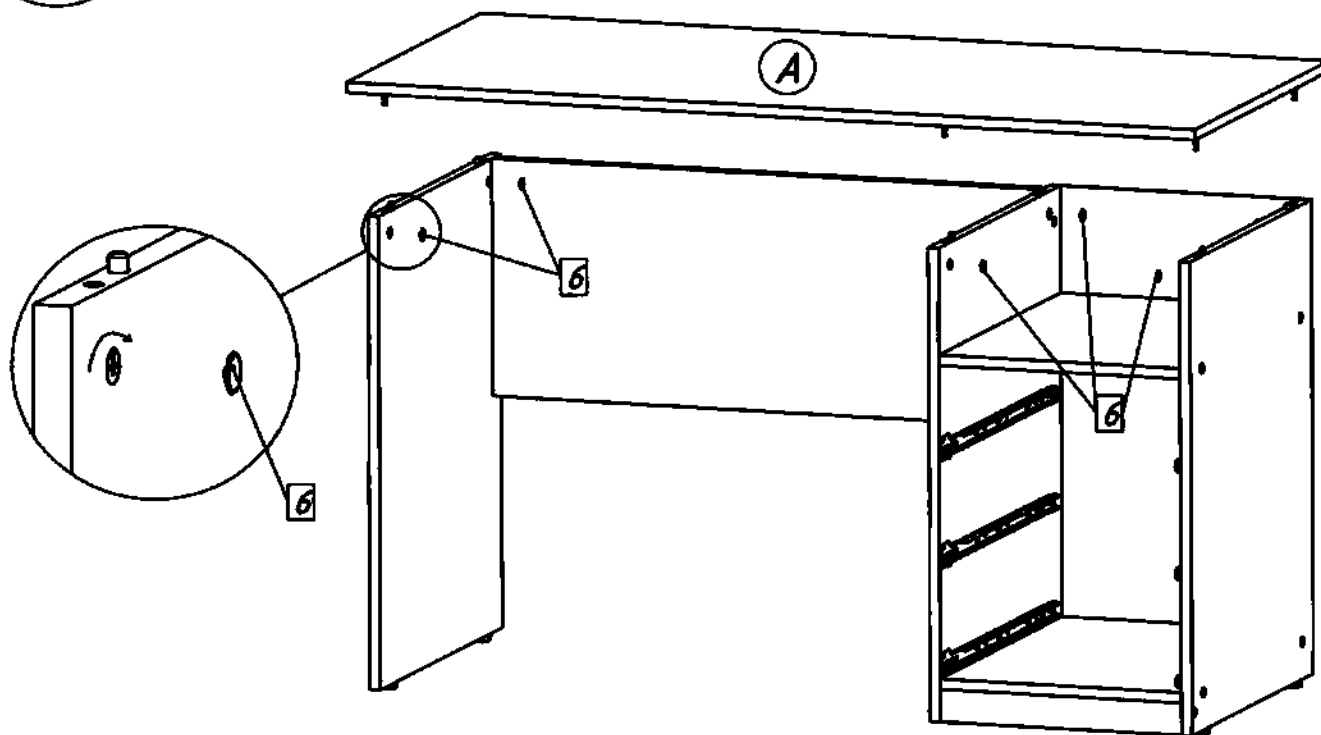

Установив столешницу, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке шесть эксцентриков [4]. После этого установите заглушки эксцентриков [6].


Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков

Соберите каждые стенки Л, М, Н в 3-х экземплярах

11 этап

Лх1 шт.
Мх1 шт.
Нх1 шт.
3х6 шт.
4х2 шт.

х3

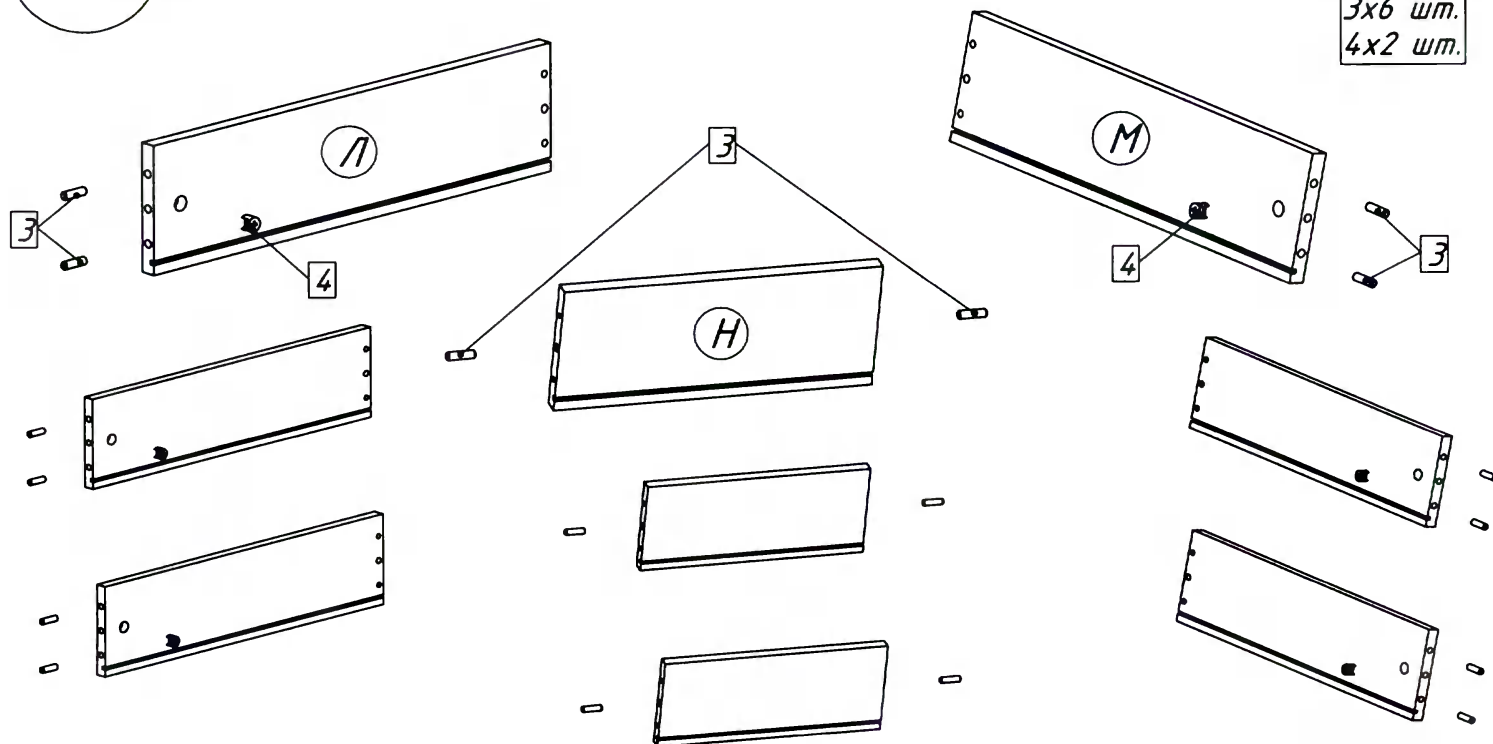


Произведите сборку 3-х каркасов ящиков

12 этап

Лх1 шт.
Мх1 шт.
Нх1 шт.
1х4 шт.

х3

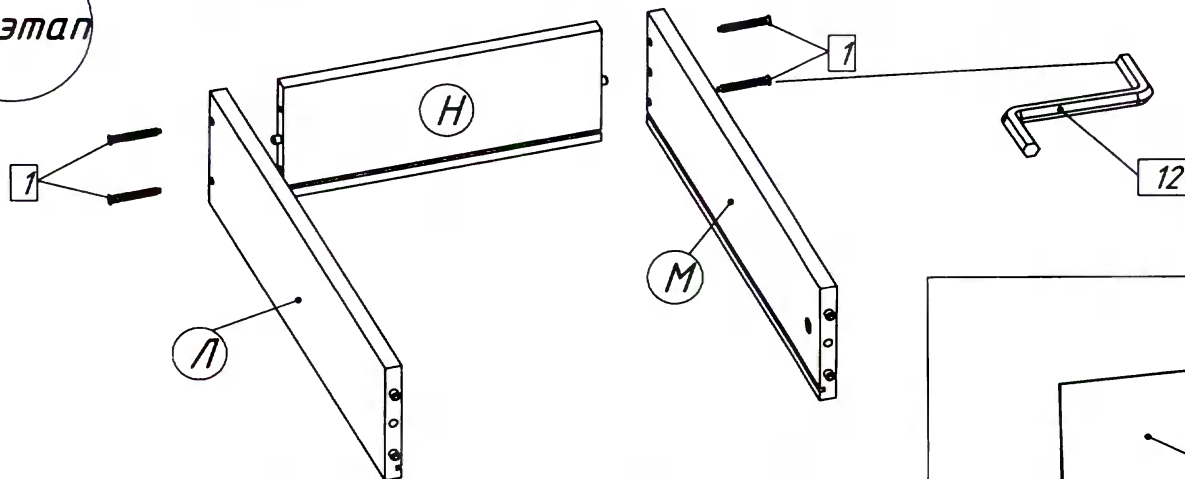

Произведите установку дна для 3-х ящиков


13 этап

Ох3 шт.

Окрашенная
сторона




Окрашенная
сторона

Окрашенная
сторона

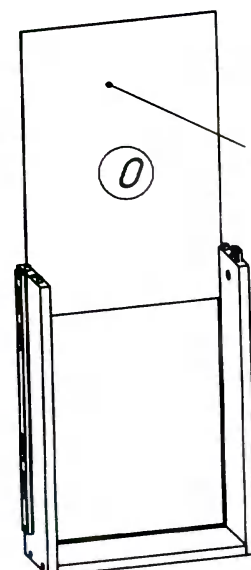

Произведите сборку 3-х фасадов ящиков

14 этап

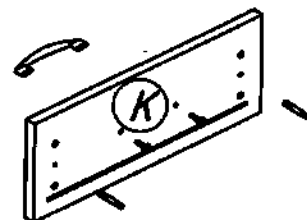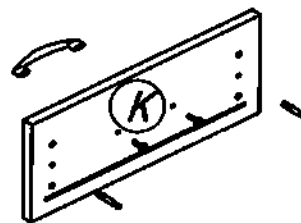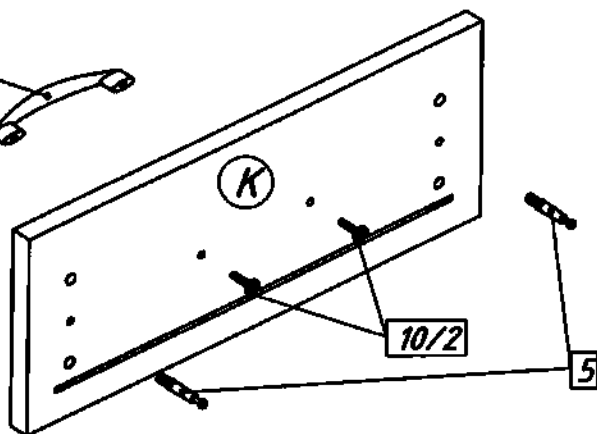

Kx1 шт.
5x2 шт.
10/1x1 шт.
10/2x2 шт.






x3

Произведите сборку 3-х ящиков

15 этап

Схема фиксации фасада (K) и установки заглушек (6)

Соединив фасад (K) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (4) для их фиксации. Затем установите заглушки (6)

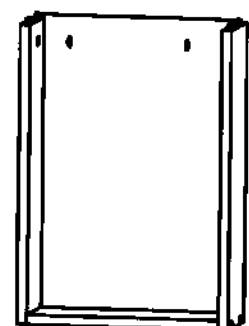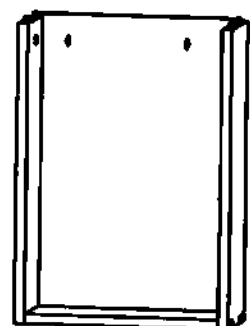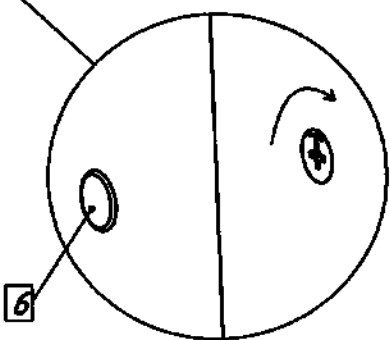
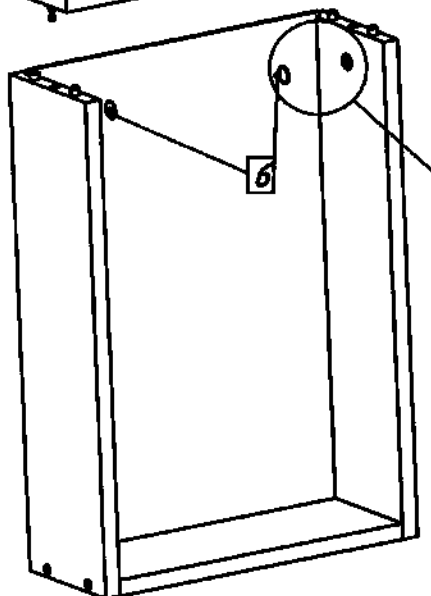
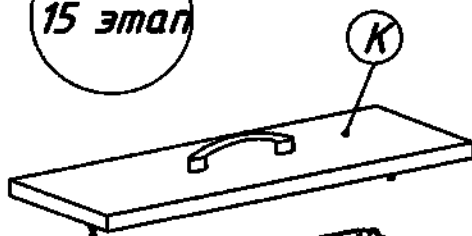


Kx1 шт.
6x2 шт.

x3

16 этап




Произведите установку направляющих на 3 ящика

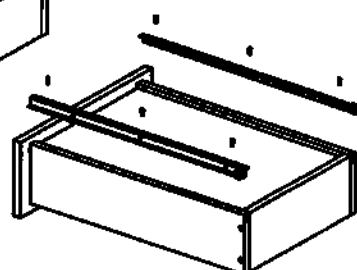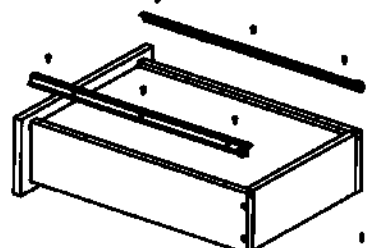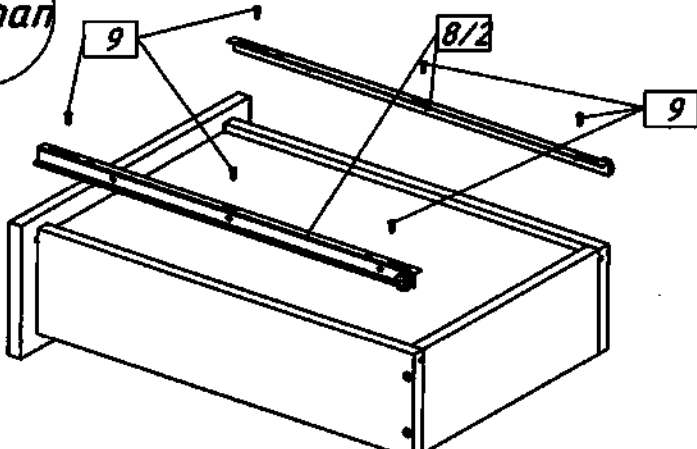

8/2x2 шт.
9x6 шт.

x3


17 этап

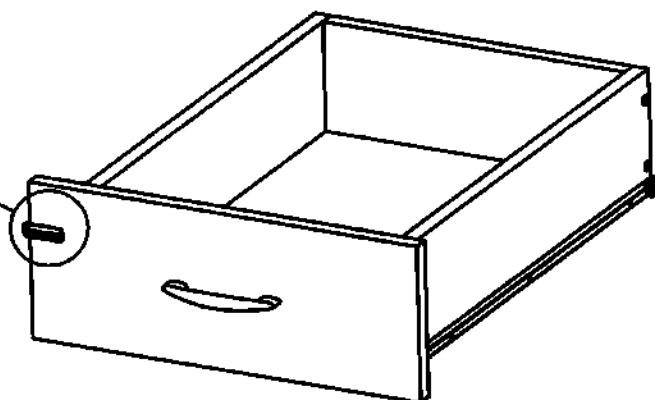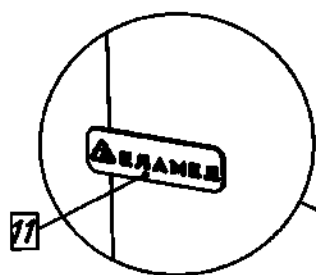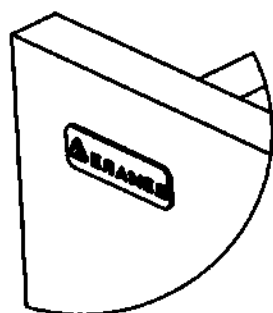


18 этап

Установите ящики

ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик
с наклеенным логотипом компании
должен быть установлен
в верхней части
встроенной тумбы

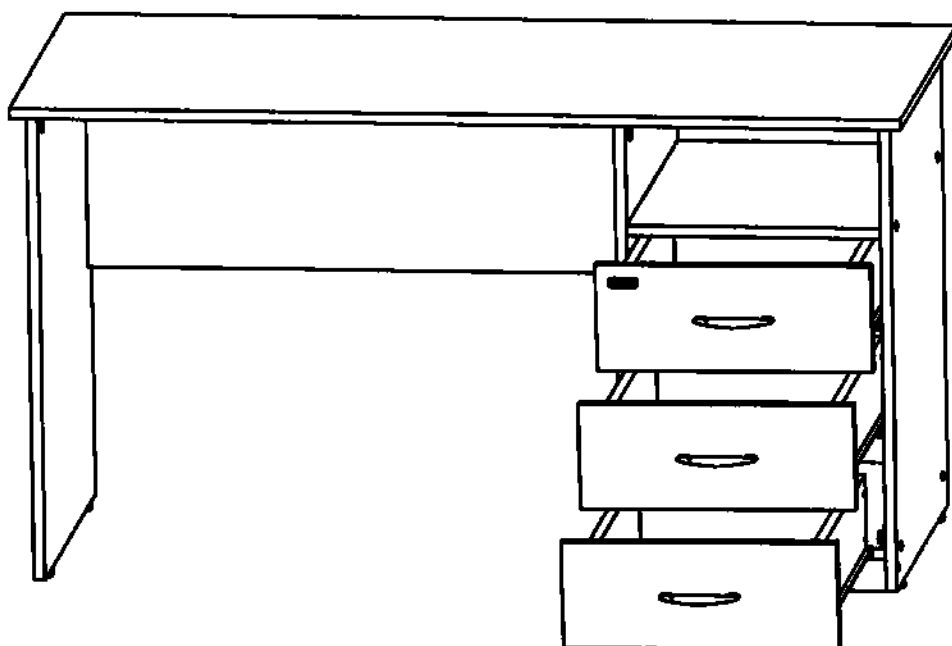


Сборка изделия завершена

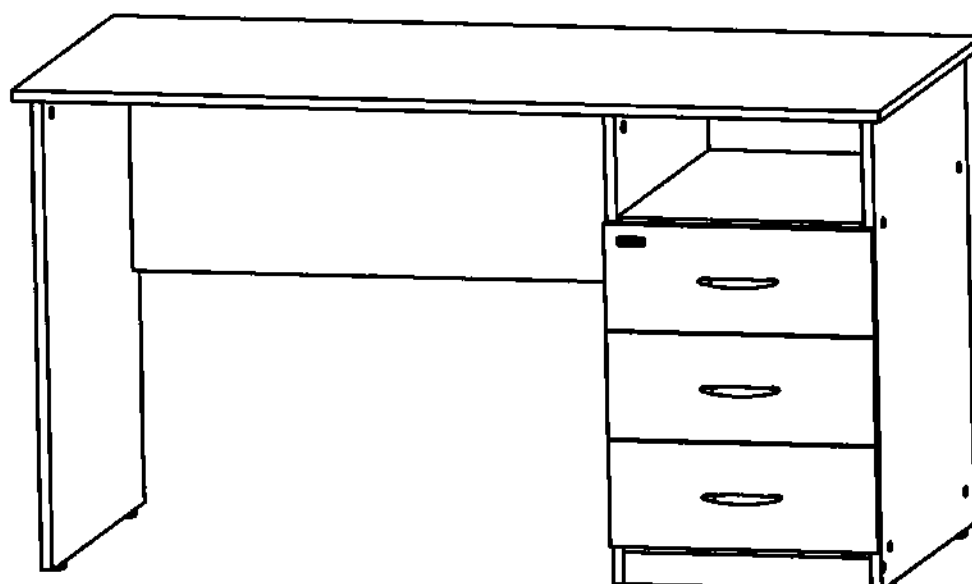

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942810.114ТУ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.4)

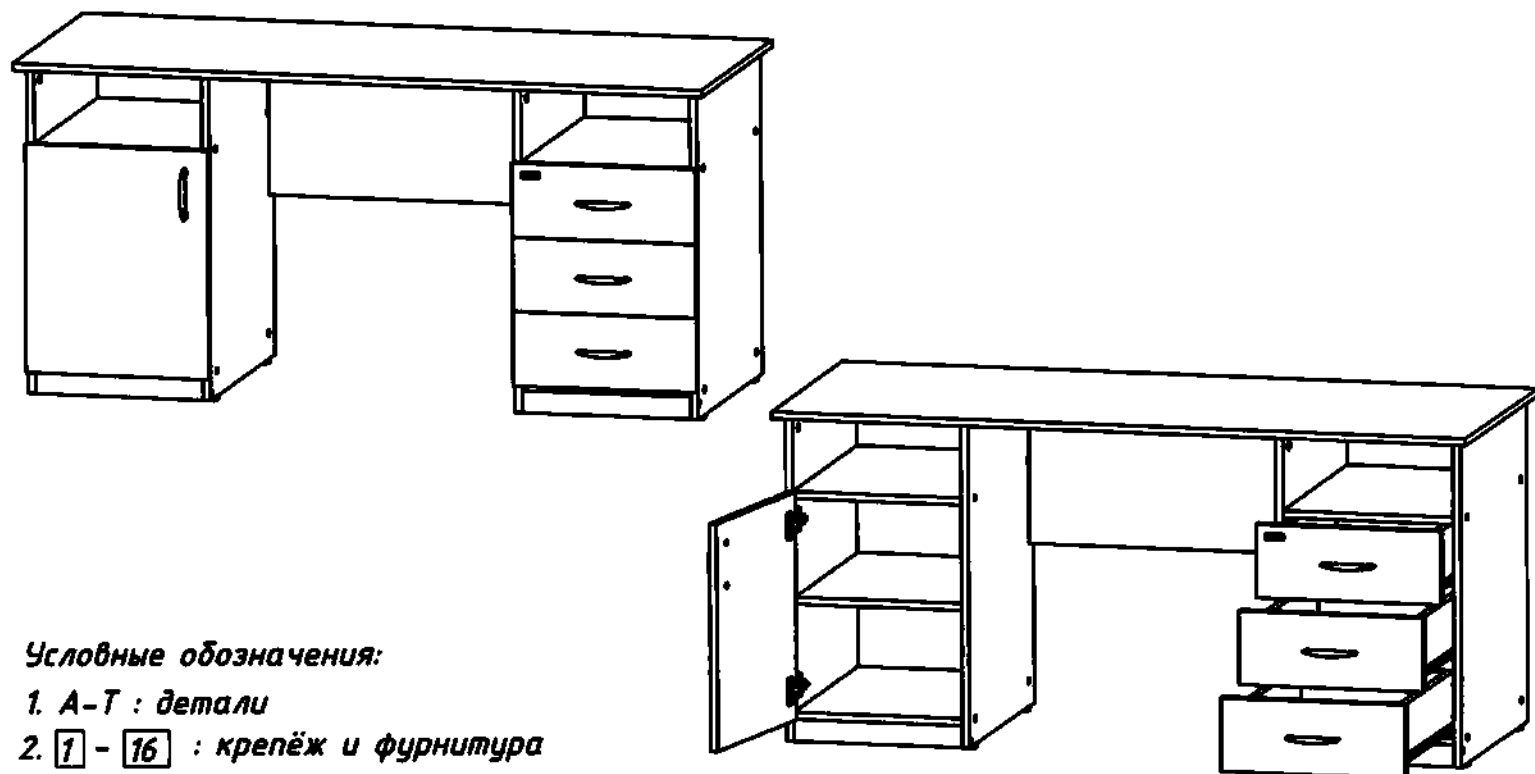

Условные обозначения:

1. А-Т : детали

2. 1 - 16 : крепёж и фурнитура




3. 1 - 22 : этапы сборки

Код товара: _____

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	1
Д	Стенка средняя левая	1
Е	Стенка средняя правая	1
Ж	Основание тумбы	2
З	Полка тумбы	2
И	Стенка задняя левой тумбы	1
К	Стенка задняя правой тумбы	1
Л	Царга	2
М	Фасад выдвижного ящика	3
Н	Стенка левая выдвижного ящика	3
О	Стенка правая выдвижного ящика	3
П	Стенка задняя выдвижного ящика	3
Р	Дно выдвижного ящика	3
С	Дверь	1
Т	Полка тумбы съёмная	1

Крепёж и фурнитура

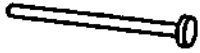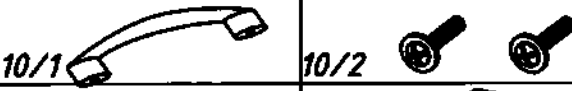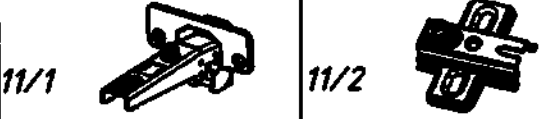Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	36	Конфирмат	
2	24	Заглушка конфирмата	
3	46	Шкант мебельный	
4	14	Эксцентрик	
5	14	Шток эксцентрика	
6	14	Заглушка эксцентрика	
7	40	Гвоздь 1,6x25	
8	3 комплекта	Направляющие роликовые	
9	36	Саморез 3,5x13	
10	4 комплекта	Ручка мебельная	
11	2 комплекта	Петля накладная, монтажная планка	
12	8	Саморез 4x16	
13	4	Полкодержатель	
14	1	Логотип компании	
15*	1	Ключ шестигранный	
16	8	Опора стола	


* Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранным **15** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

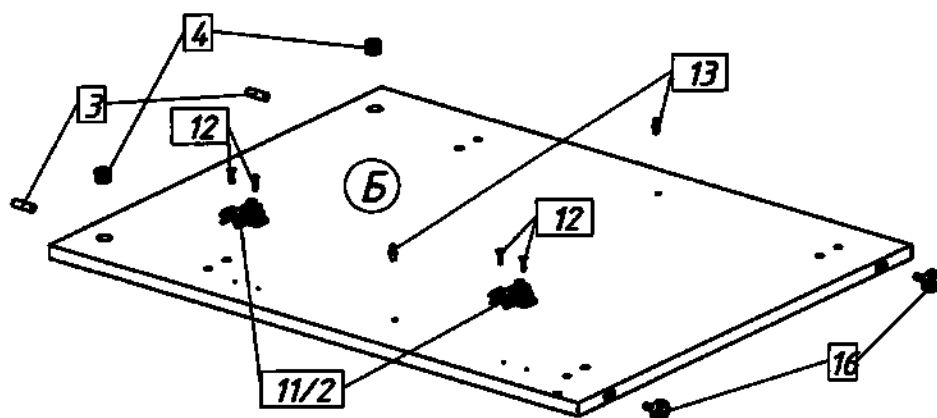Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

5x1 шт.

3x2 шт.

4x2 шт.

11/1x2 шт.


12x4 шт.

13x2 шт.

16x2 шт.

2 этап

Произведите сборку стенки правой

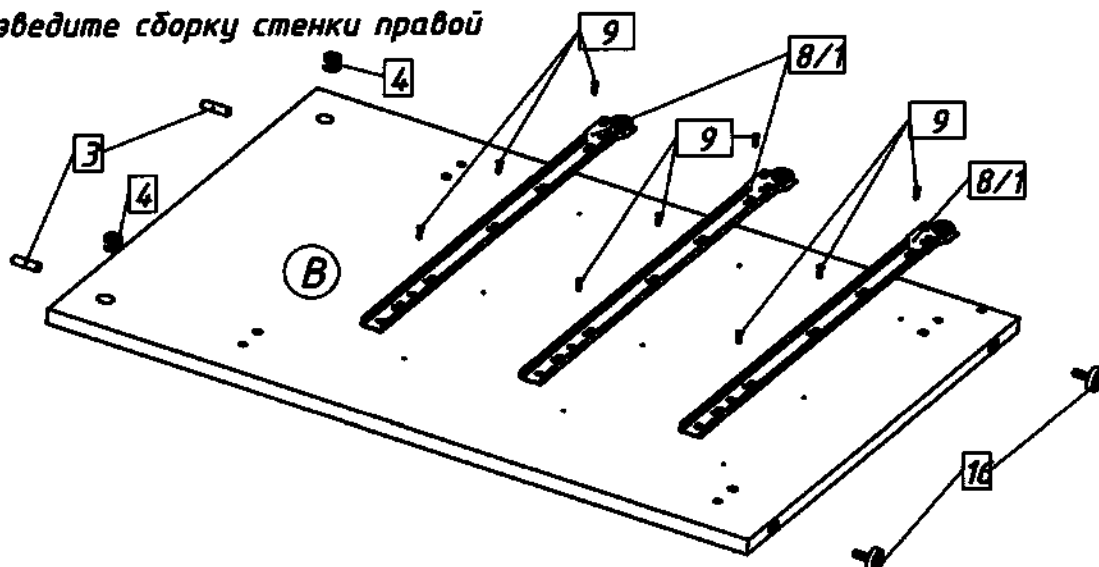

6x1 шт.

3x2 шт.

4x2 шт.


8/1x3 шт.

9x9 шт.

16x2 шт.

3 этап

Произведите сборку стенки задней

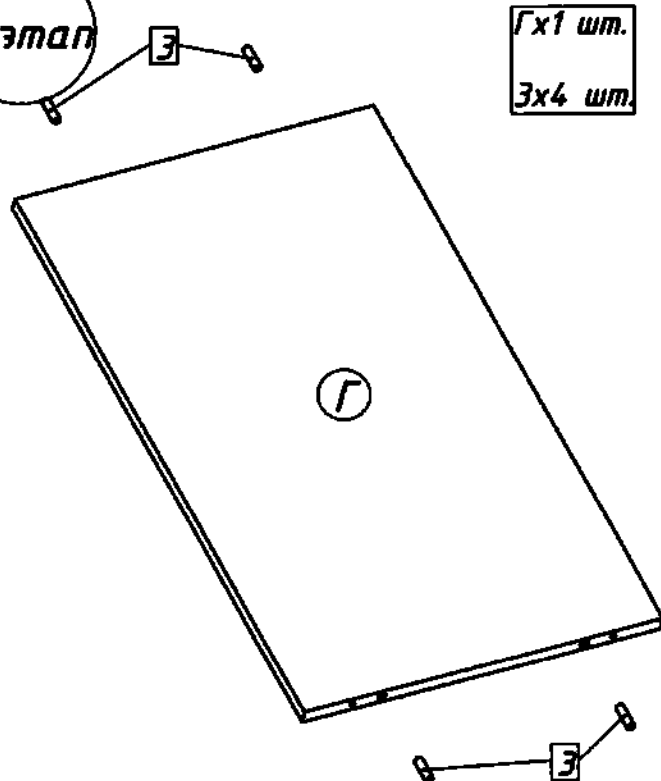


Гx1 шт.

3x4 шт.

4 этап

Произведите сборку основания и полки тумбы

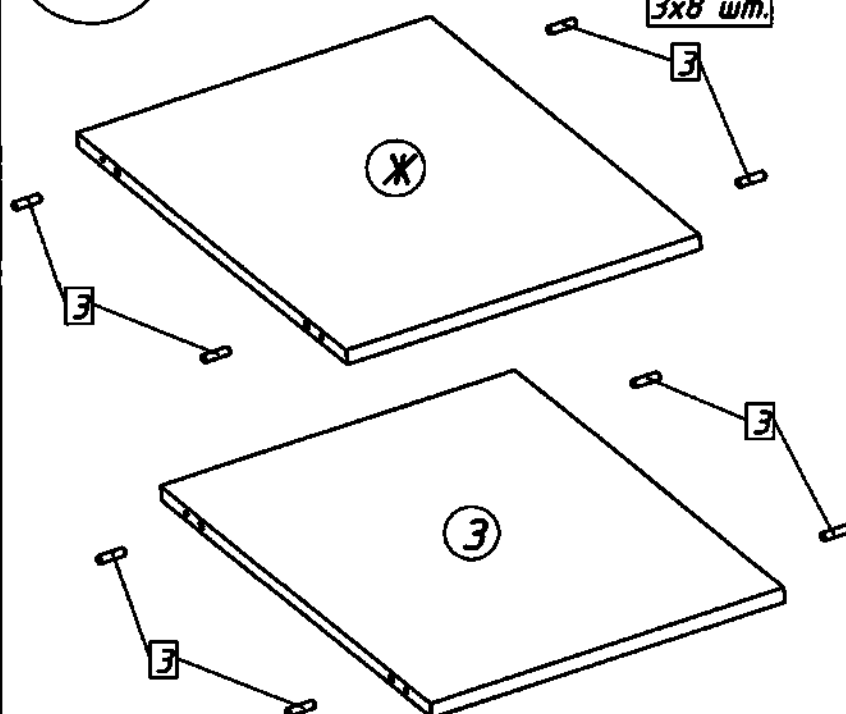


Жx1 шт.

3x1 шт.

3x8 шт.

x2

5 этап

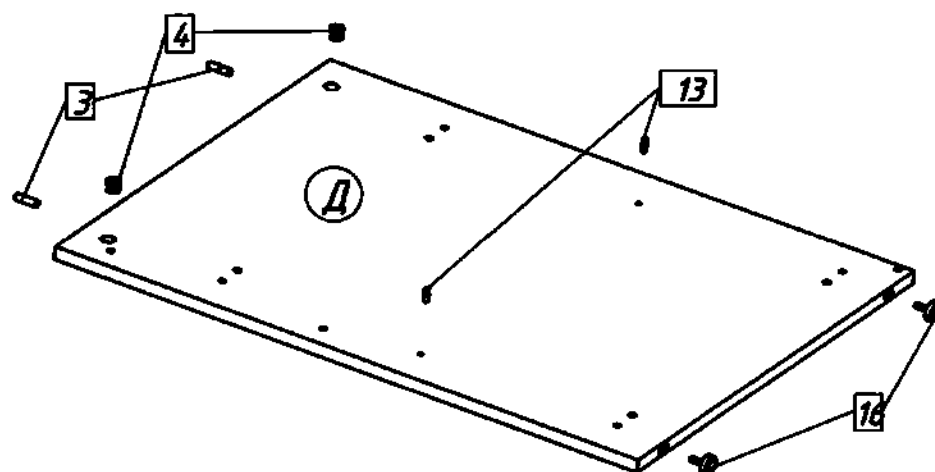


Дх1 шт.

3х2 шт.
4х2 шт.
13х2 шт.
16х2 шт.

6 этап

Произведите сборку стенки средней правой

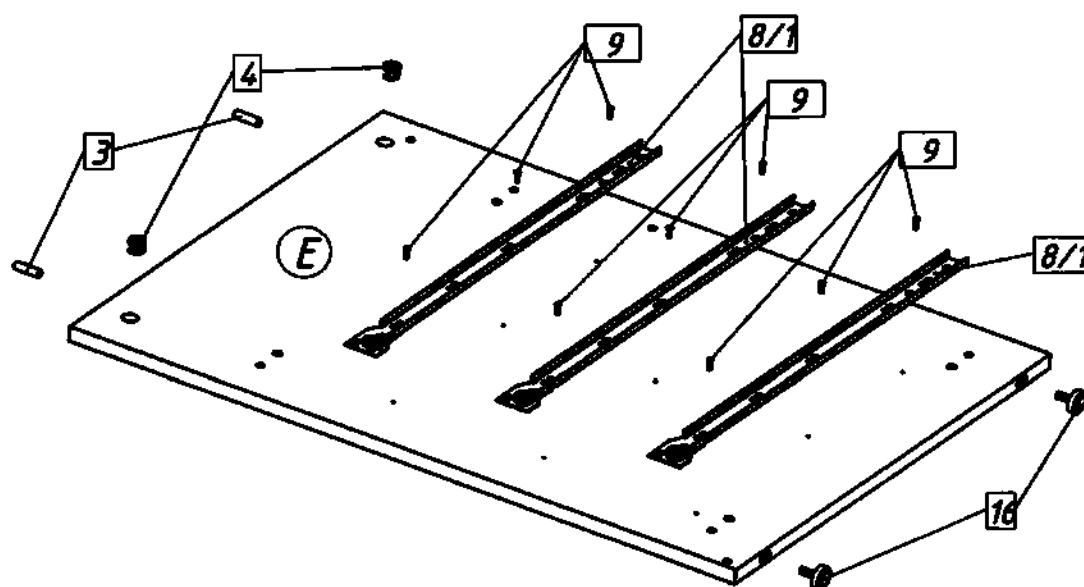


Ех1 шт.

3х2 шт.
4х2 шт.
8/1х3 шт.
9х9 шт.
16х2 шт.

7 этап

Произведите сборку каркаса стола, соединив между собой стенку левую, стенку среднюю и стенку заднюю

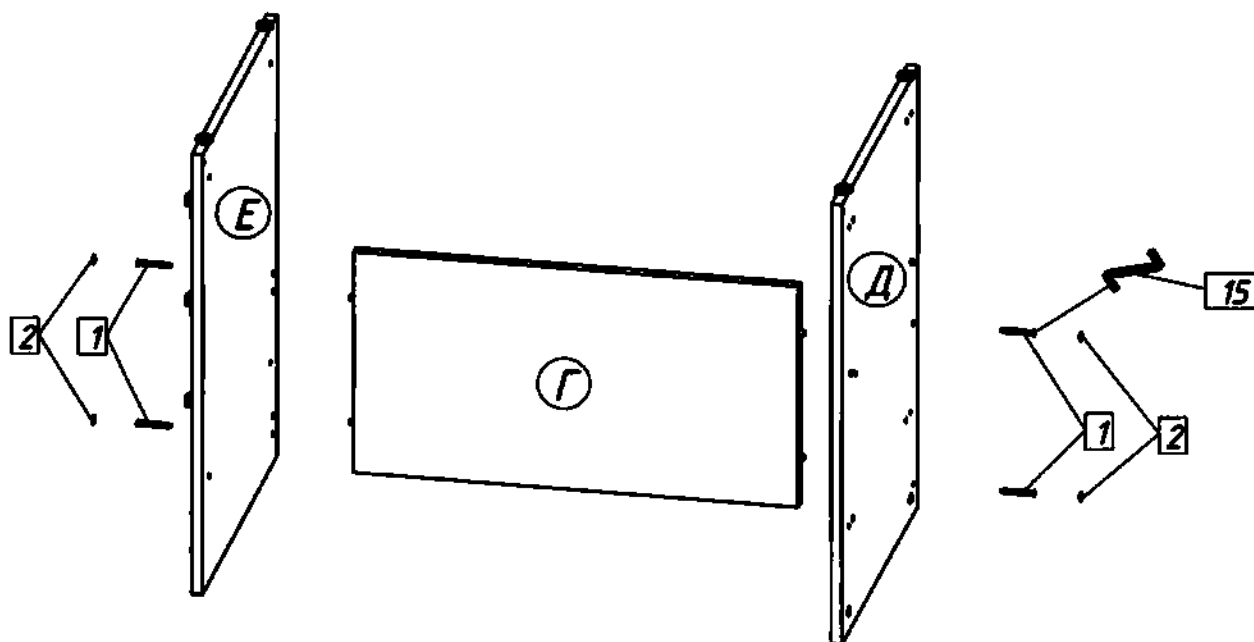


Бх1 и
Гх1 шт.
Дх1 шт.

1х4 шт.
2х4 шт.

ОМ 29.759.01


Закончите сборку каркаса стола

8 этап

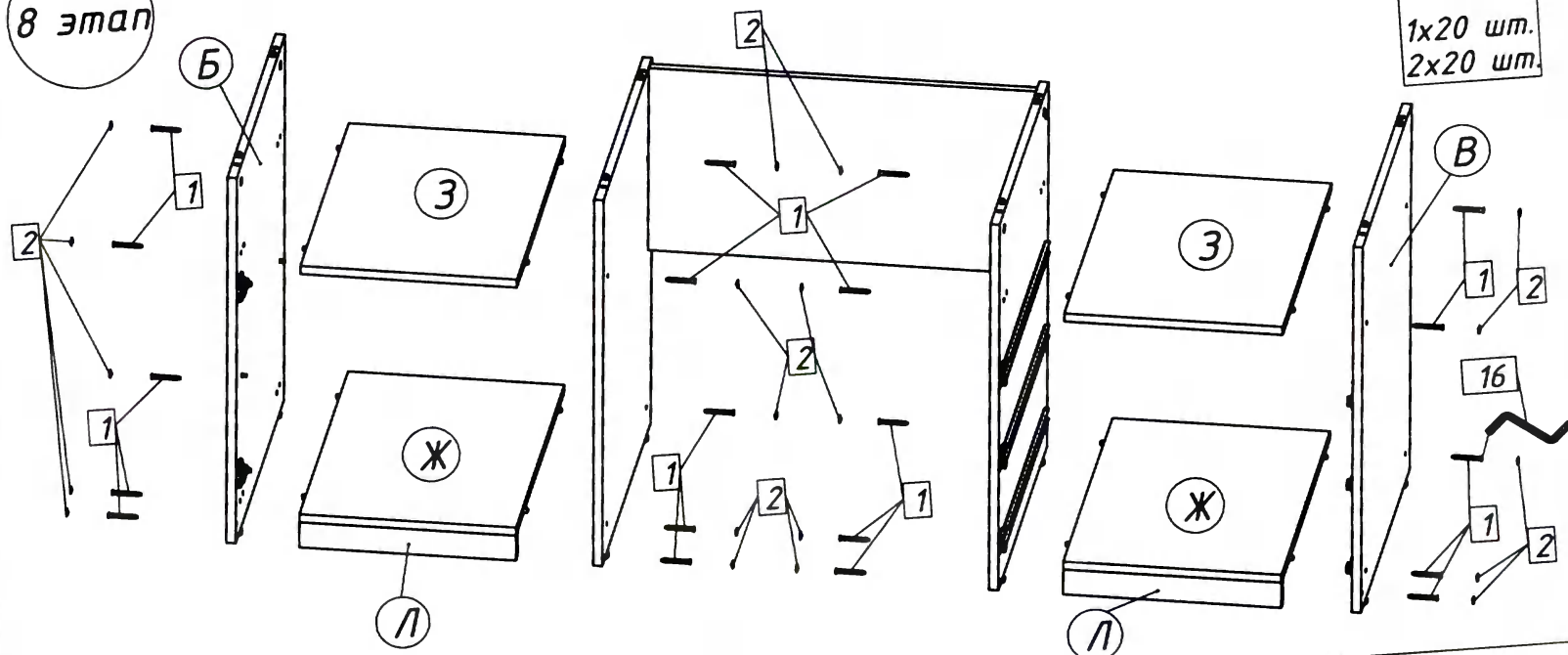

Произведите установку стенок задних


9 этап

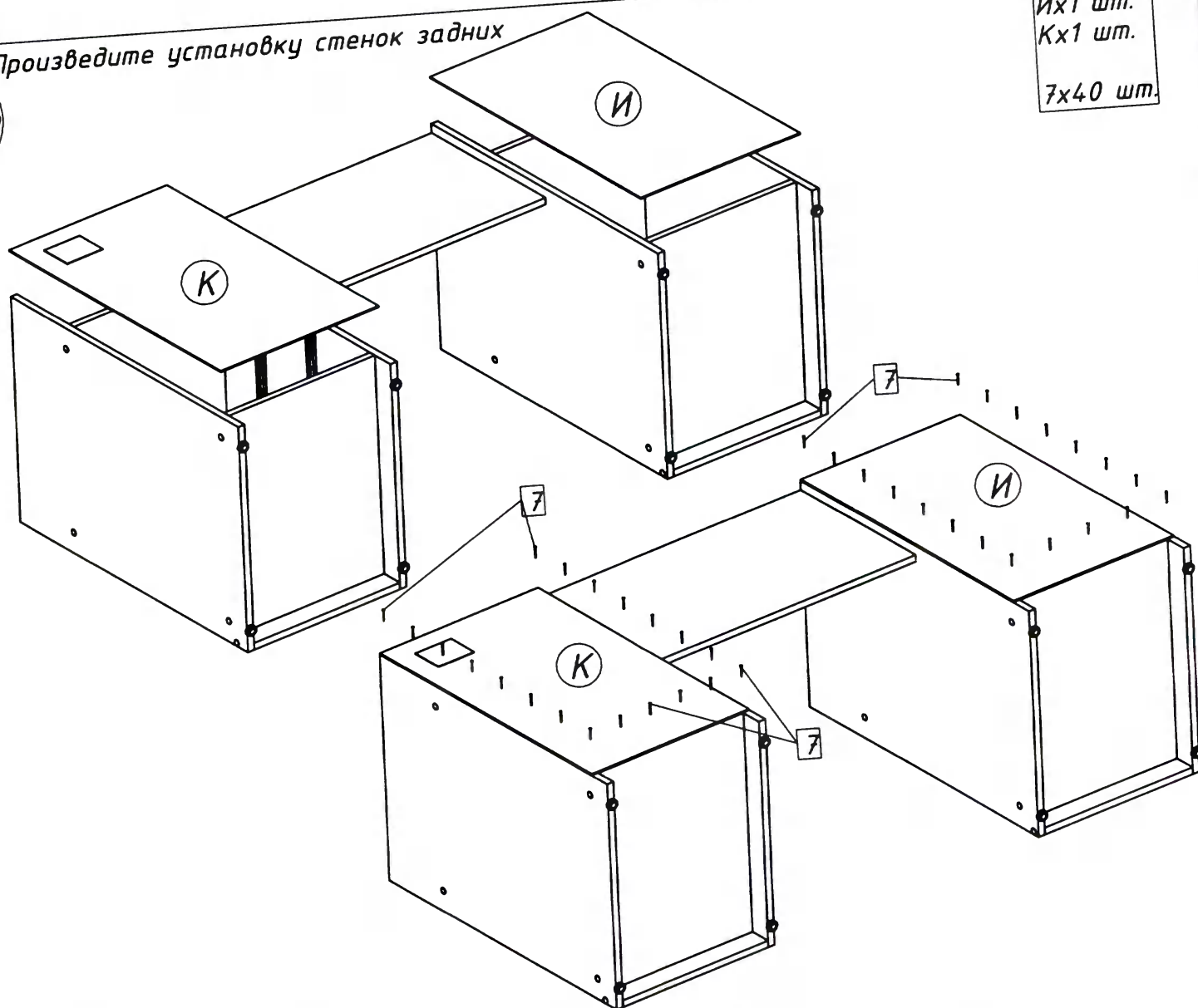

для размещения и хранения медицинских изделий (мод.4)


10 этап

Произведите сборку столешницы

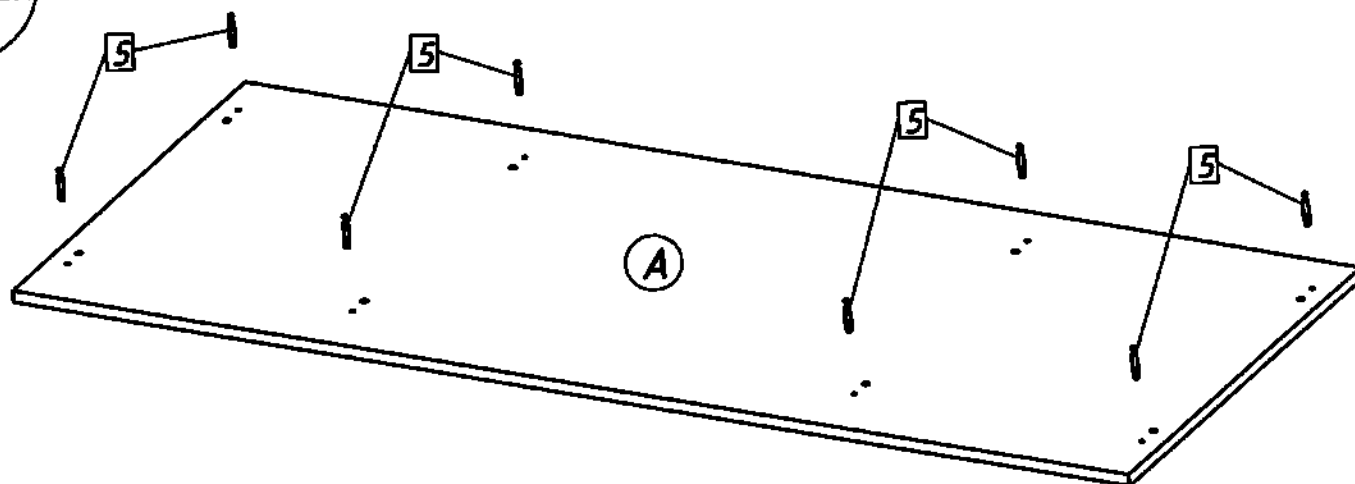

11 этап

Произведите установку столешницы

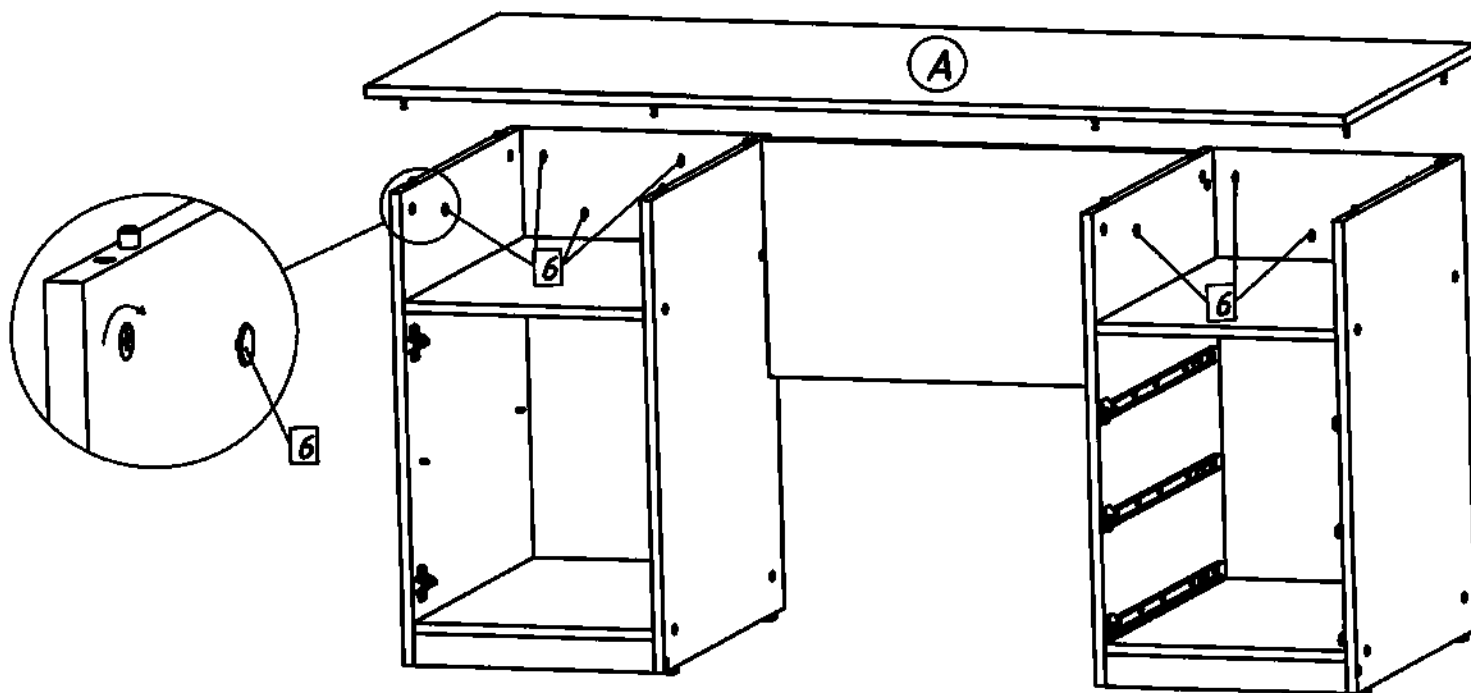

Установив столешницу, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке восемь эксцентриков [4]. После этого установите заглушки эксцентриков [6].


Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков

Соберите каждые стенки (Н), (О), (П) в 3-х экземплярах

12 этап

Нх1 шт.
Ох1 шт.
Пх1 шт.
3х6 шт.
4х2 шт.

х3

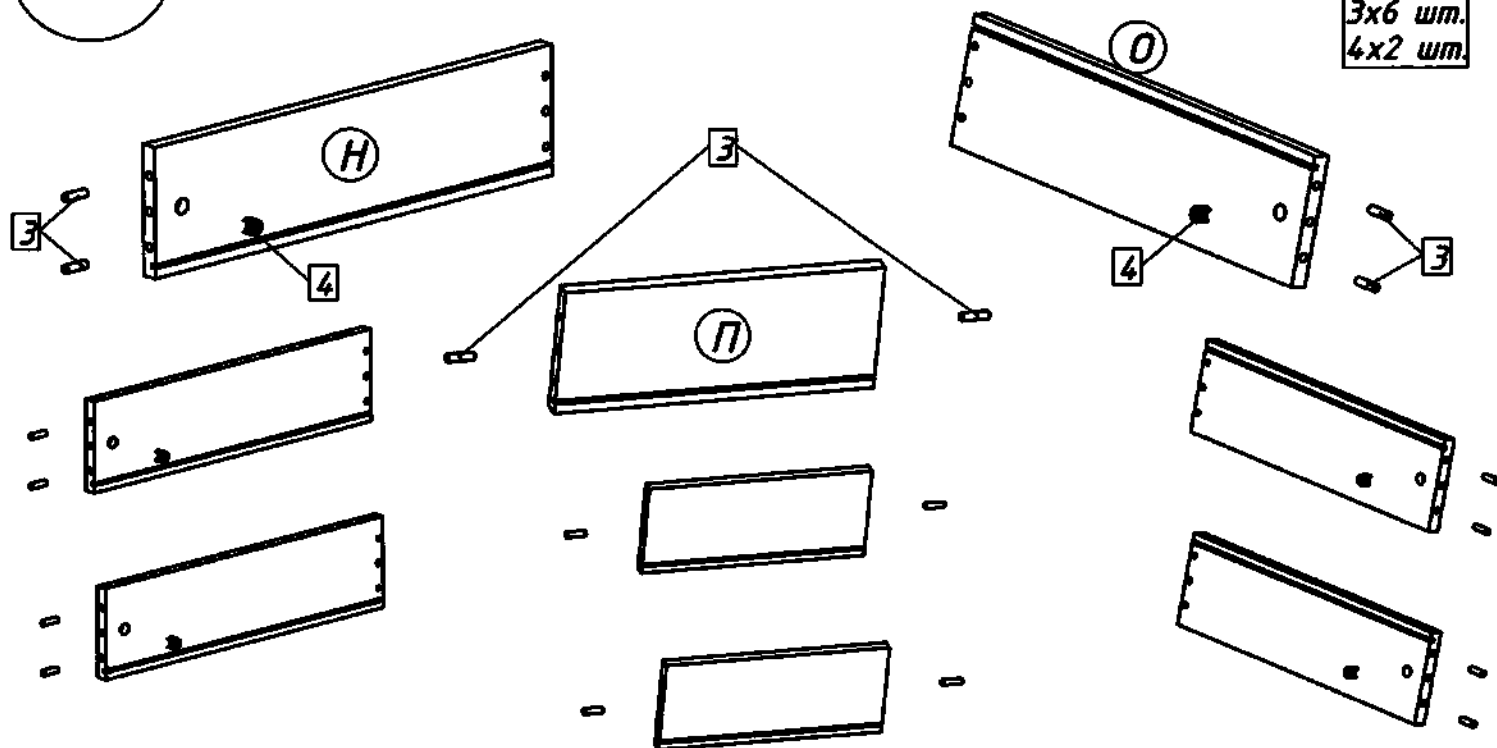


Произведите сборку 3-х каркасов ящиков

13 этап

Нх1 шт.
Ох1 шт.
Пх1 шт.
1х4 шт.

х3

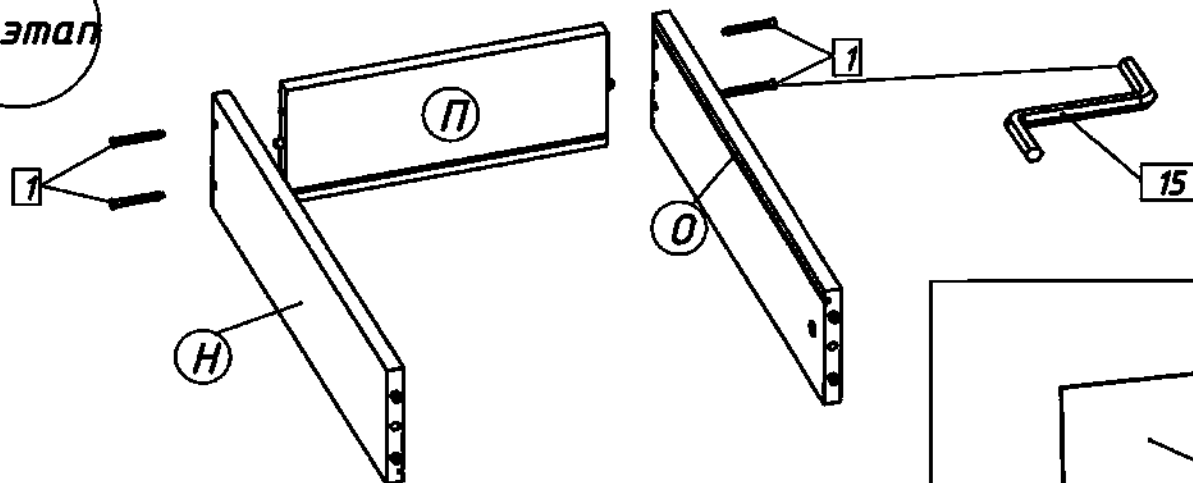

Произведите установку дна для 3-х ящиков


14 этап

Рх3 шт.

Окрашенная сторона




Окрашенная сторона

Окрашенная сторона

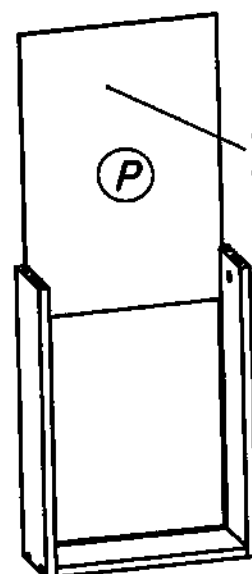

Произведите сборку 3-х фасадов ящиков

15 этап

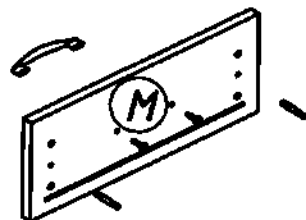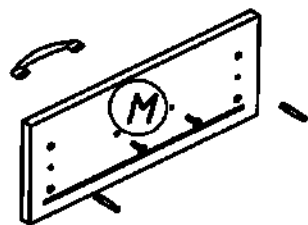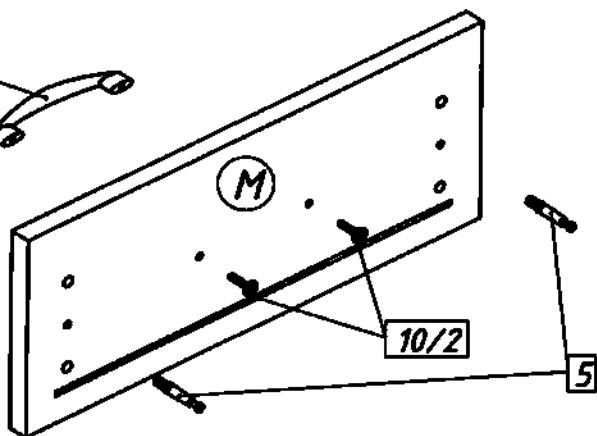

Mx1 шт.

5x2 шт.
10/1x1 шт.
10/2x2 шт.

x3






Произведите сборку 3-х ящиков

16 этап

Схема фиксации фасада (M) и установки заглушек (6)

Соединив фасад (M) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (4)

для их фиксации. Затем установите заглушки (6)

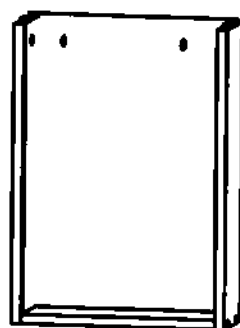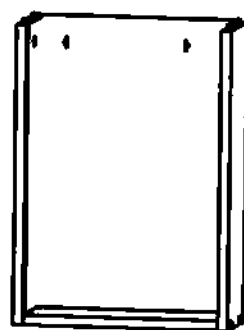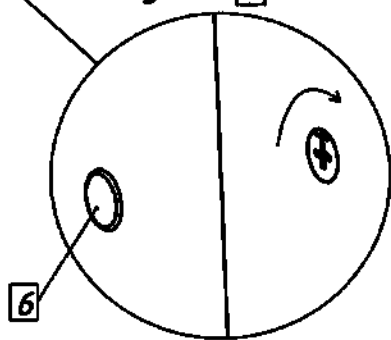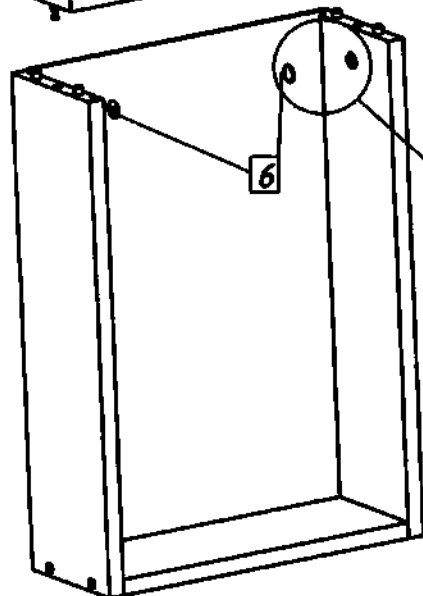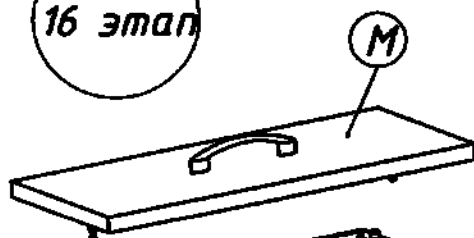

Mx1 шт.

6x2 шт.




x3

17 этап

Произведите установку направляющих на 3 ящика

8/2x2 шт.
9x6 шт.


x3

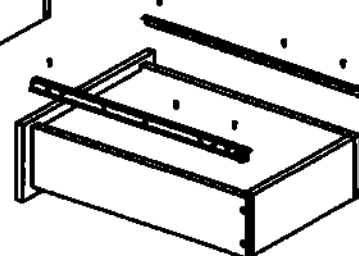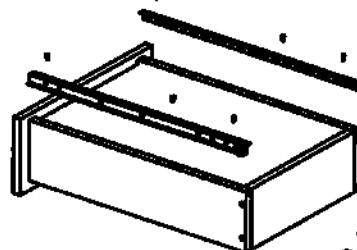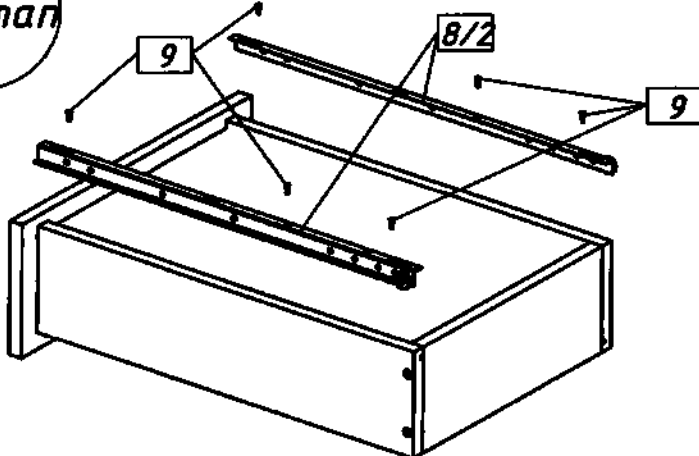

Наклейте на один из ящиков
самоклеющийся логотип компании


14x1 шт.

18 этап

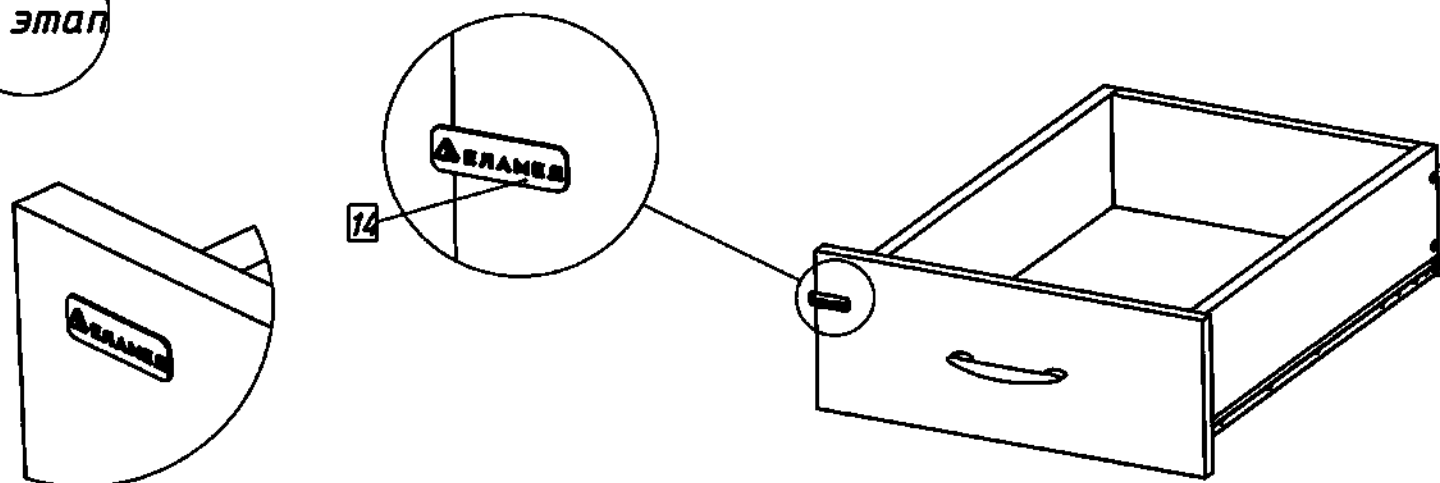

19 этап

Произведите сборку двери

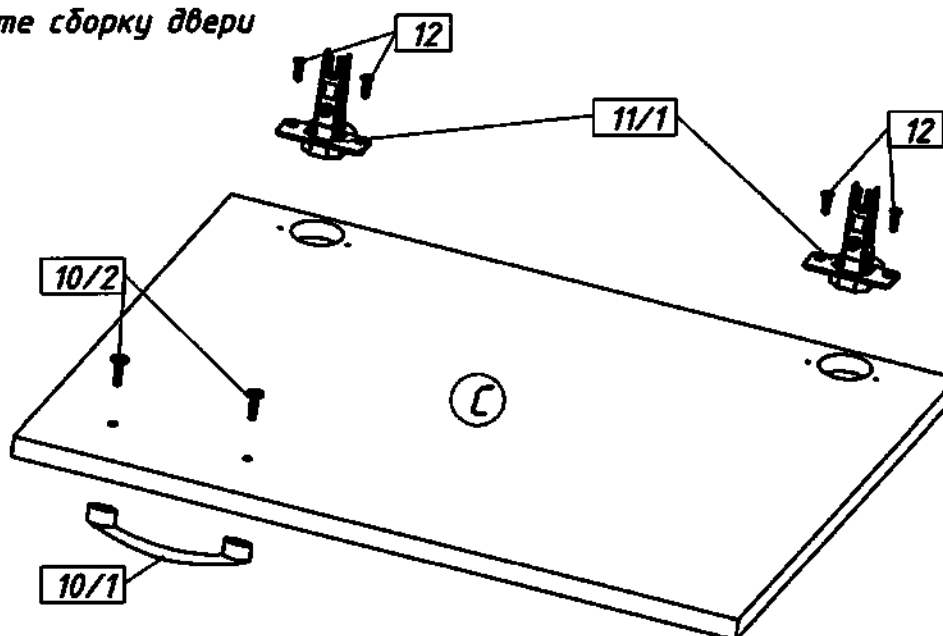


Cx1 шт.

10/1x1 шт.
10/2x2 шт.
11/1x2 шт.
12x4 шт.


20 этап

Произведите установку полки

Tx1 шт.

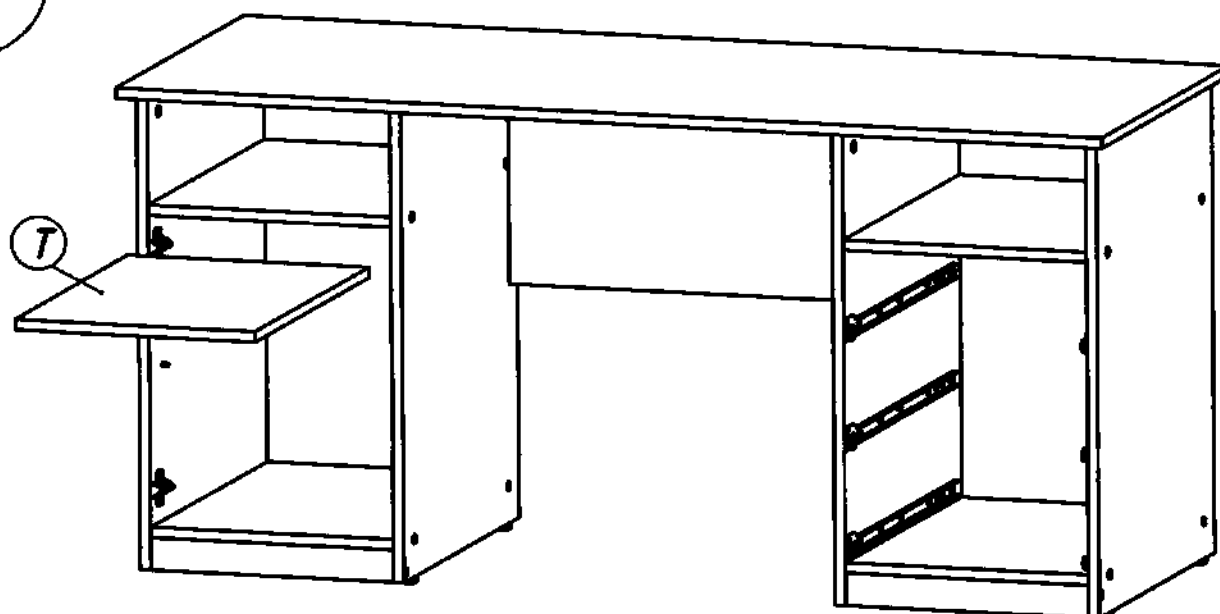


21 этап

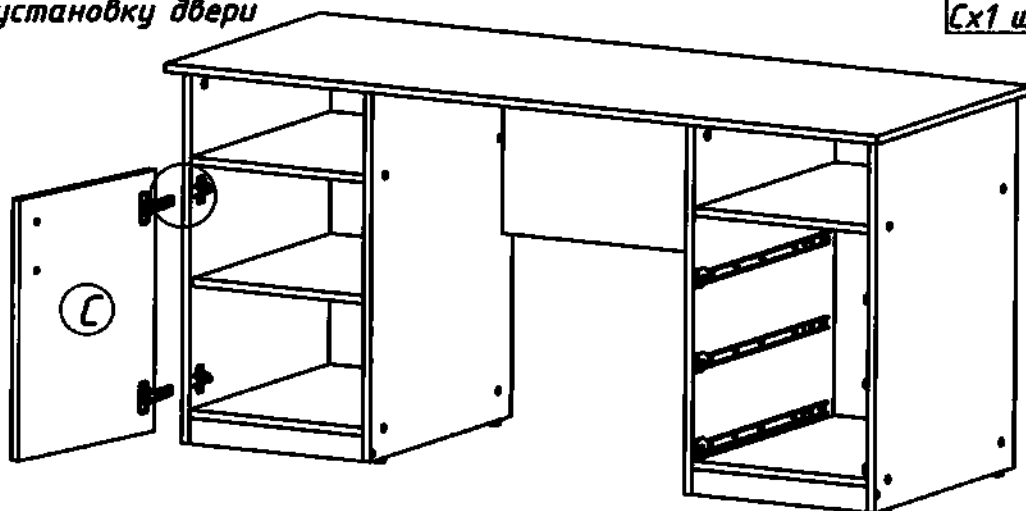

После установки двери
произведите регулировку
петель с затяжкой всех
винтов и саморезов

Боковая регулировка
(перекос двери)

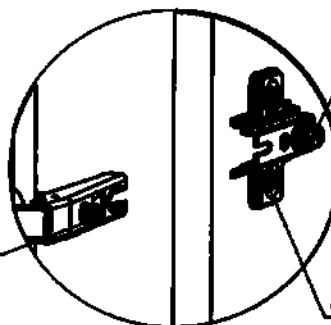


Фронтальная регулировка

Вертикальная регулировка


Установите ящики

22 этап

ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик
с наклеенным логотипом компании
должен быть установлен
в верхней части
встроенной тумбы

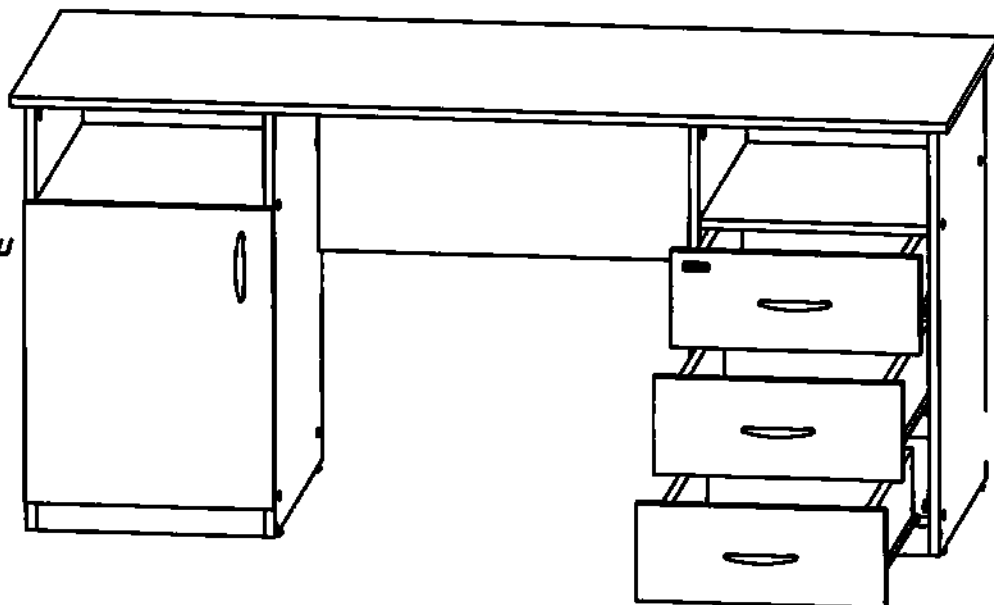


Сборка изделия завершена

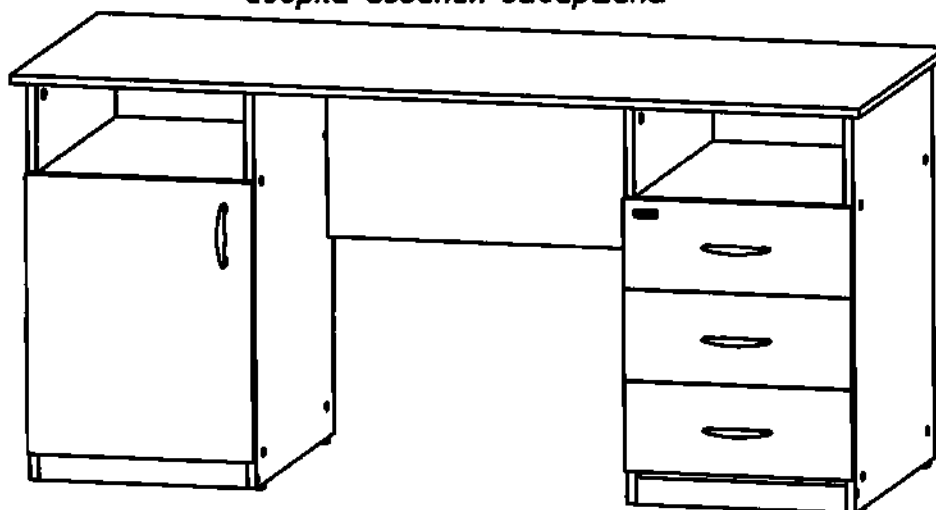

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские ГИКС.942810.114 ТУ
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.5)










Условные обозначения:



1. А-Т : детали
2. 1 - 17 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 20 : этапы сборки

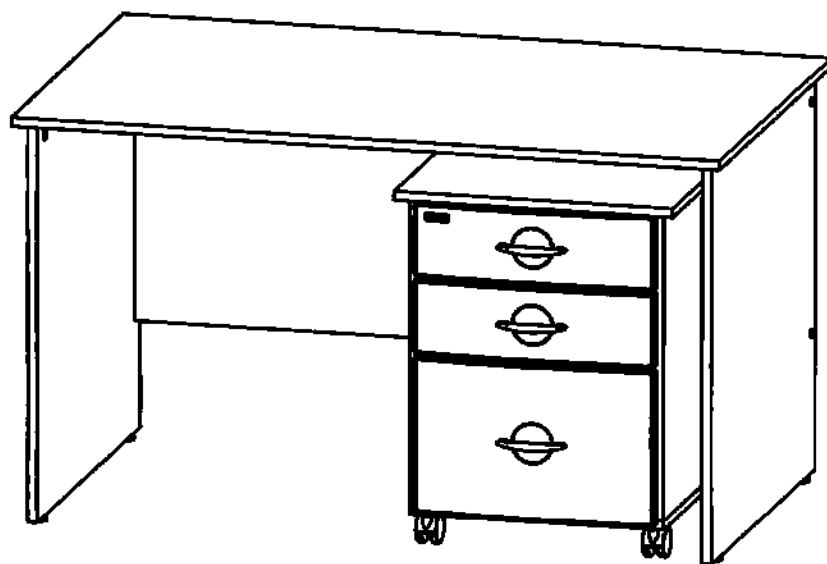

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка тумбы левая	1
Б	Стенка тумбы правая	1
В	Столешница тумбы	1
Г	Дно тумбы	1
Д	Стенка задняя тумбы	1
Е	Задняя стенка ящика	3
Ж	Правая стенка ящика	3
З	Левая стенка ящика	3
И	Дно ящика	3
К	Большой фасад ящика	1
Л	Малый фасад ящика	2
М	Стенка большого фасада ящика	1
Н	Стенка малого фасада ящика	2
О	Планка ящика	3
П	Столешница	1
Р	Задняя стенка стола	1
С	Левая стенка стола	1
Т	Правая стенка стола	1

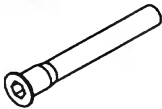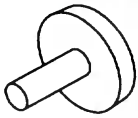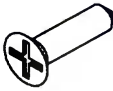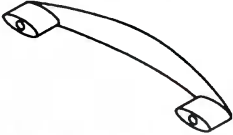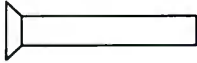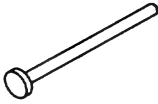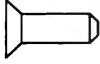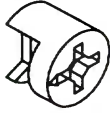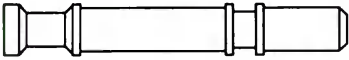Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	32	Евровинт	
2	4	Заглушка евровинта	
3	24	Шкант мебельный	
4	4	Опора стола	
5	4	Опора колесная	
6	16	Саморез 4x16	
7	3	Ручка мебельная	
8	6	Винт М4х25	
9	20	Гвоздь 1,6х25	
10	24	Саморез 4x12	
11	30	Заглушка самоклеющаяся	
12	8	Эксцентрик	
13	8	Шток эксцентрика	

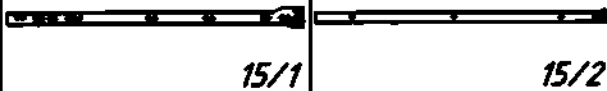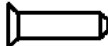
Арт.	Кол - во	Обозначение	
14	4	Заглушка эксцентрика	
15	3 комплекта	Направляющие	
16	30	Саморез 3,5x13	
17 *	1	Ключ шестигранник 4мм	
18	1	Логотип компании	

* Евровинты **1** закручивать ключом шестигранником **17** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.

1 этап

Произведите сборку левой стенки тумбы


4x1 шт.
3x4 шт.
12x2 шт.
15/1x3 шт.
16x6 шт.

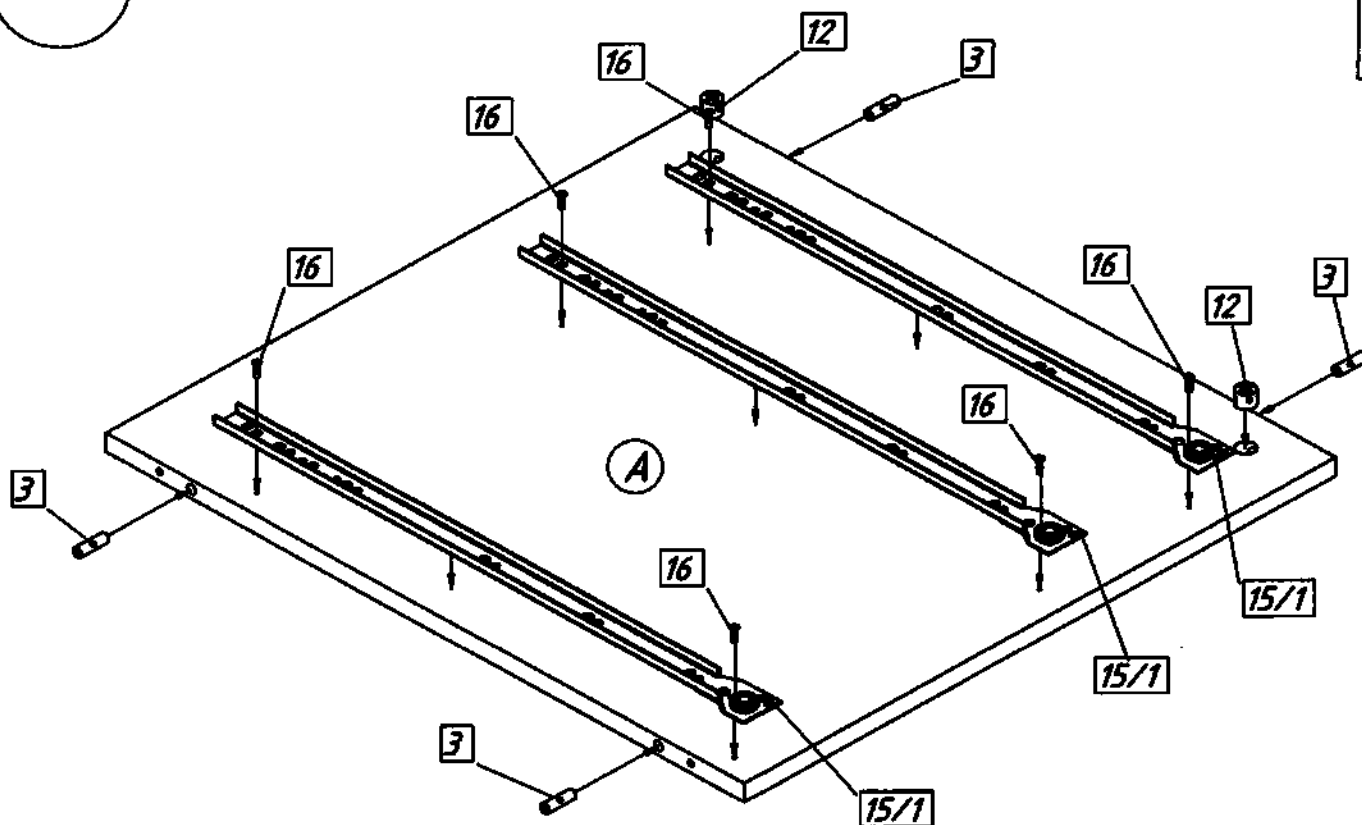

2 этап


Произведите сборку правой стенки тумбы

5x1 шт.
3x4 шт.
12x2 шт.
15/1x3 шт.
16x6 шт.

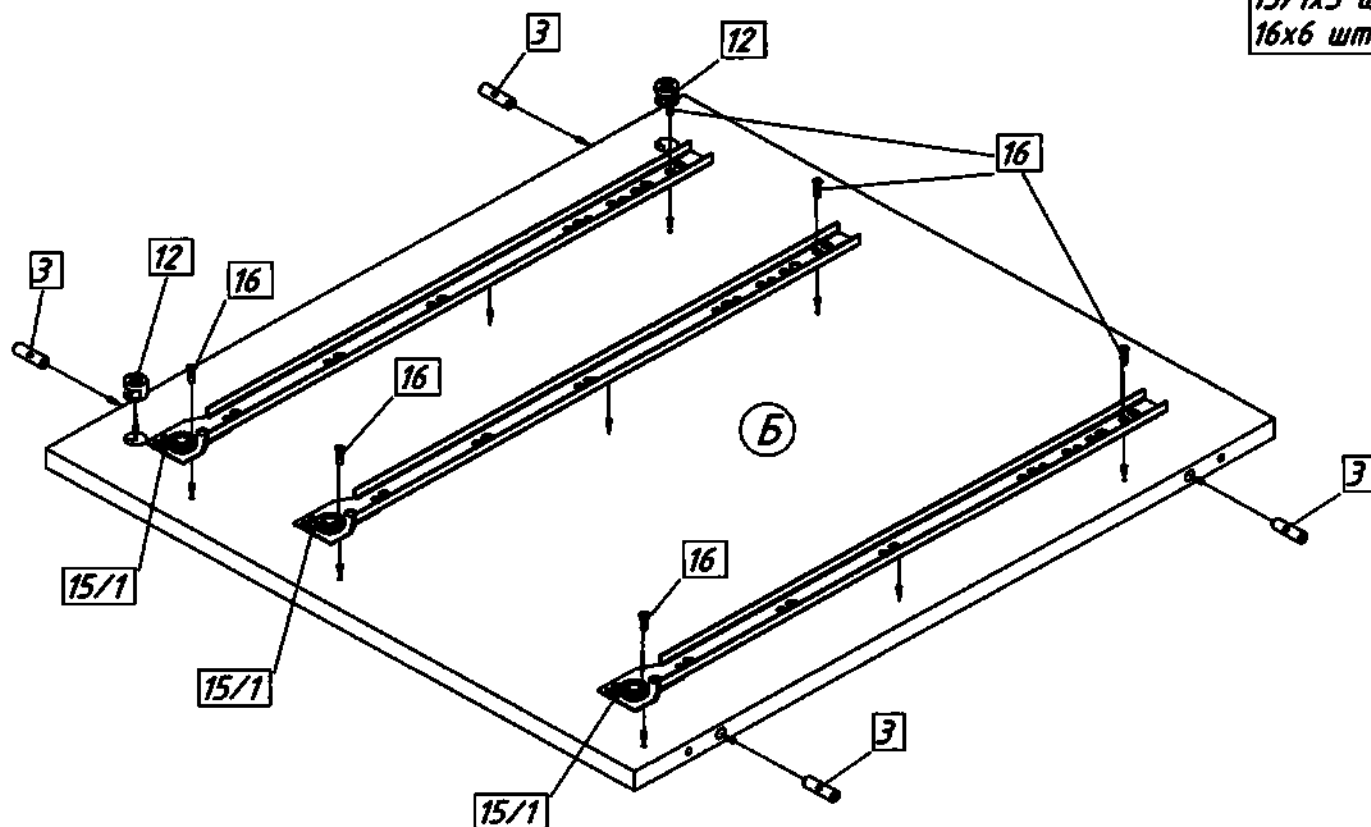

Bx1 шт.
13x4 шт.

3 этап


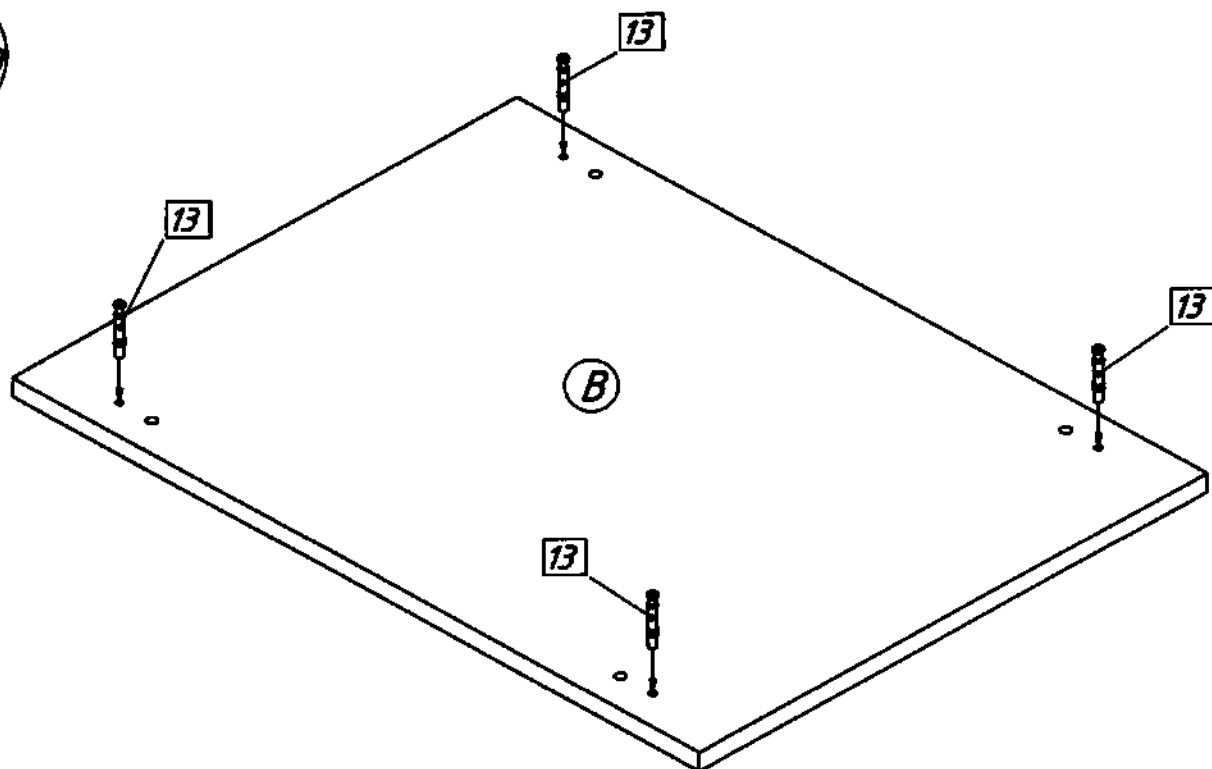


Произведите сборку каркаса тумбы

Ax1 шт.
Бx1 шт.
Bx1 шт.
Гx1 шт.
1x4 шт.

4 этап


После установки столешницы (B) зафиксируйте её, повернув эксцентрики (12) до упора часовой стрелки.

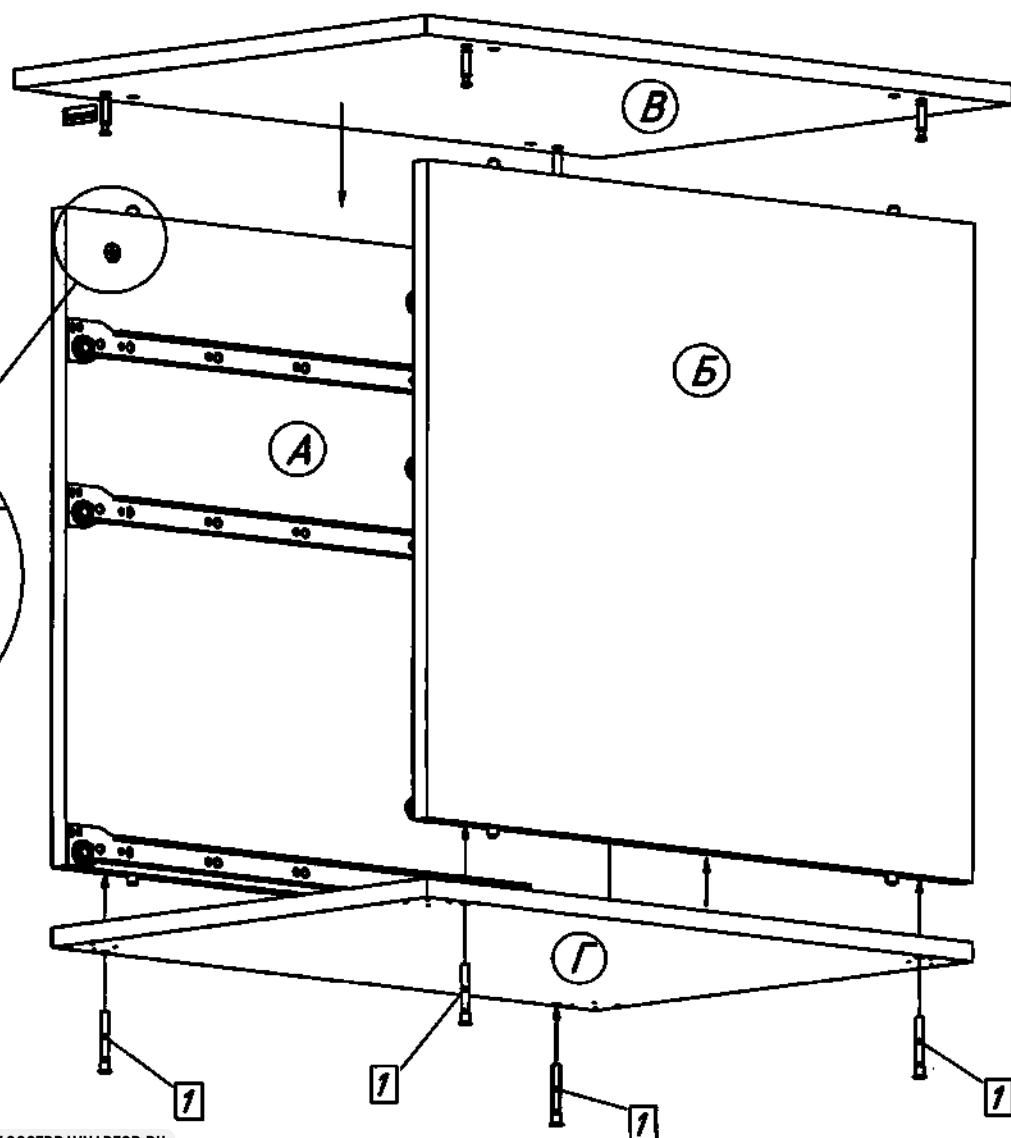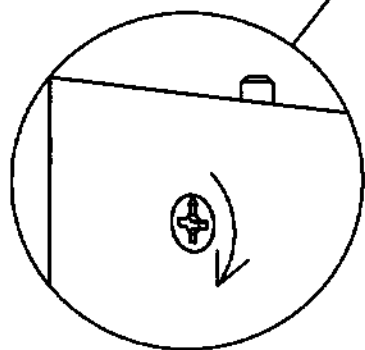

ОМ 29.1440.00
5 этап

Произведите установку и крепёж
стенки задней тумбы


Дх1 шт.
9х20 шт.

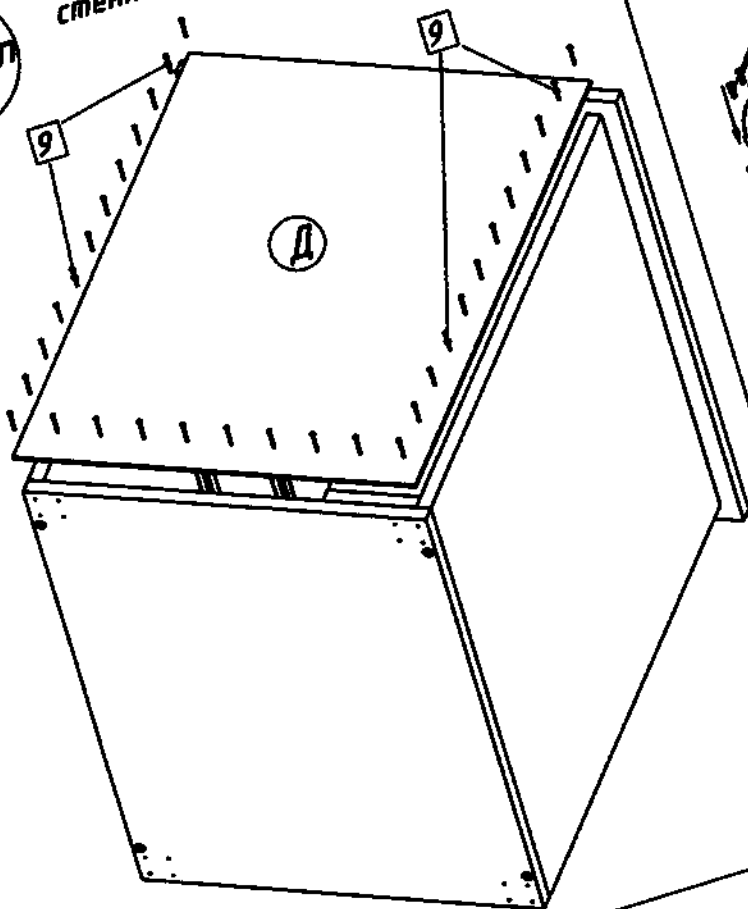

6 этап

Произведите установку
роликовых опор тумбы


5х4 шт.
6х16 шт.

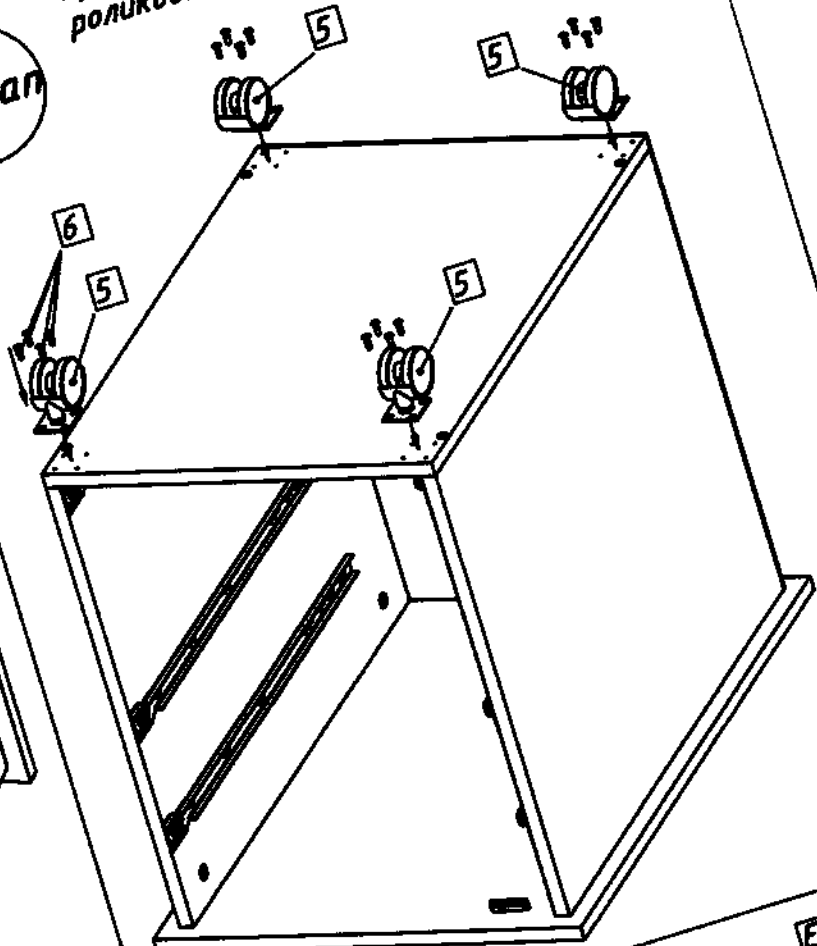

Произведите сборку каркасов 3-х ящиков


7 этап

Ех1 шт.
Их1 шт.
Жх1 шт.
Зх1 шт.
1х4 шт.
3х2 шт.

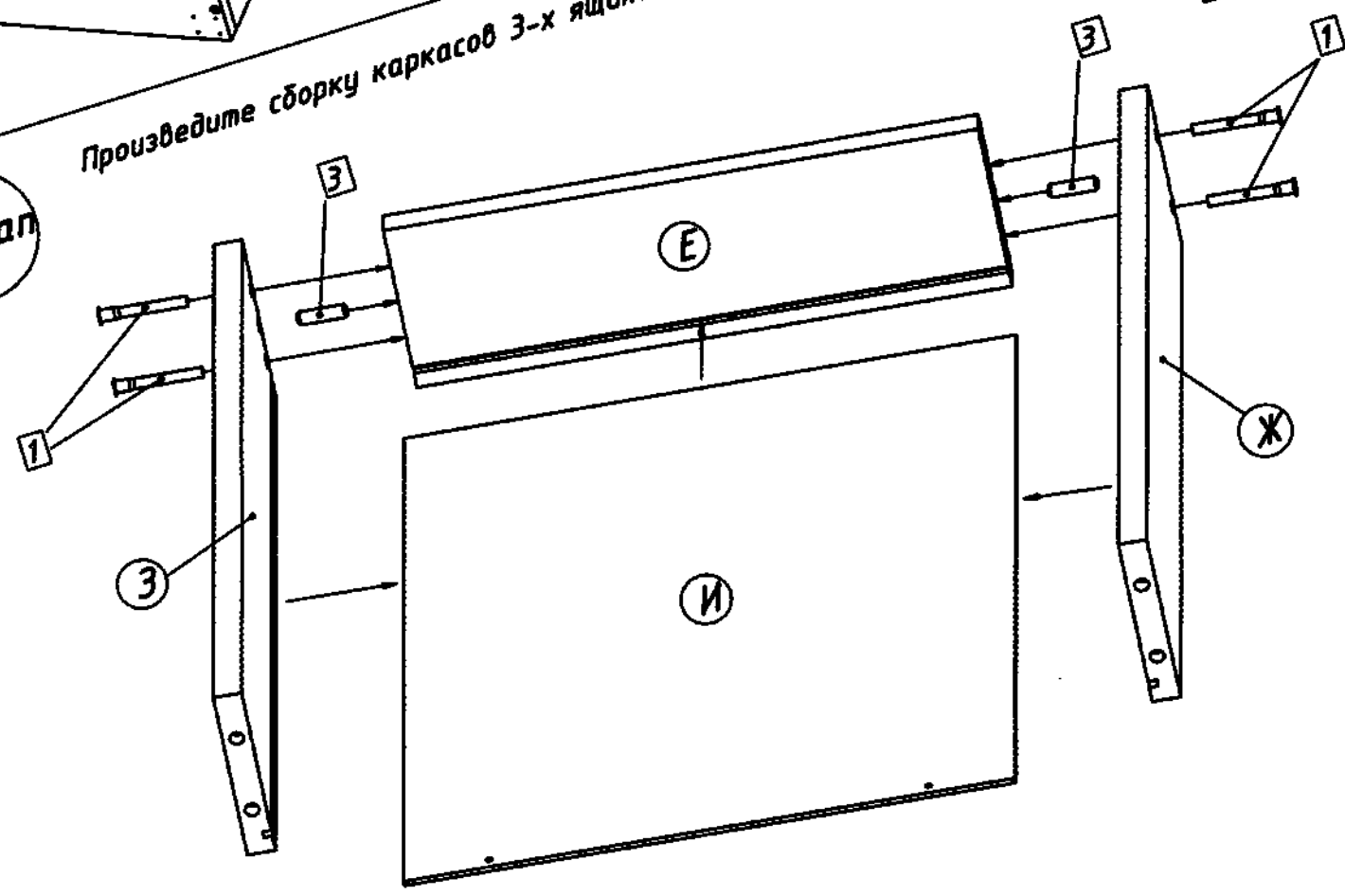

8 этап


Нх1 шт.
Ох1 шт.
1х4 шт.
10х2 шт.
16х2 шт.

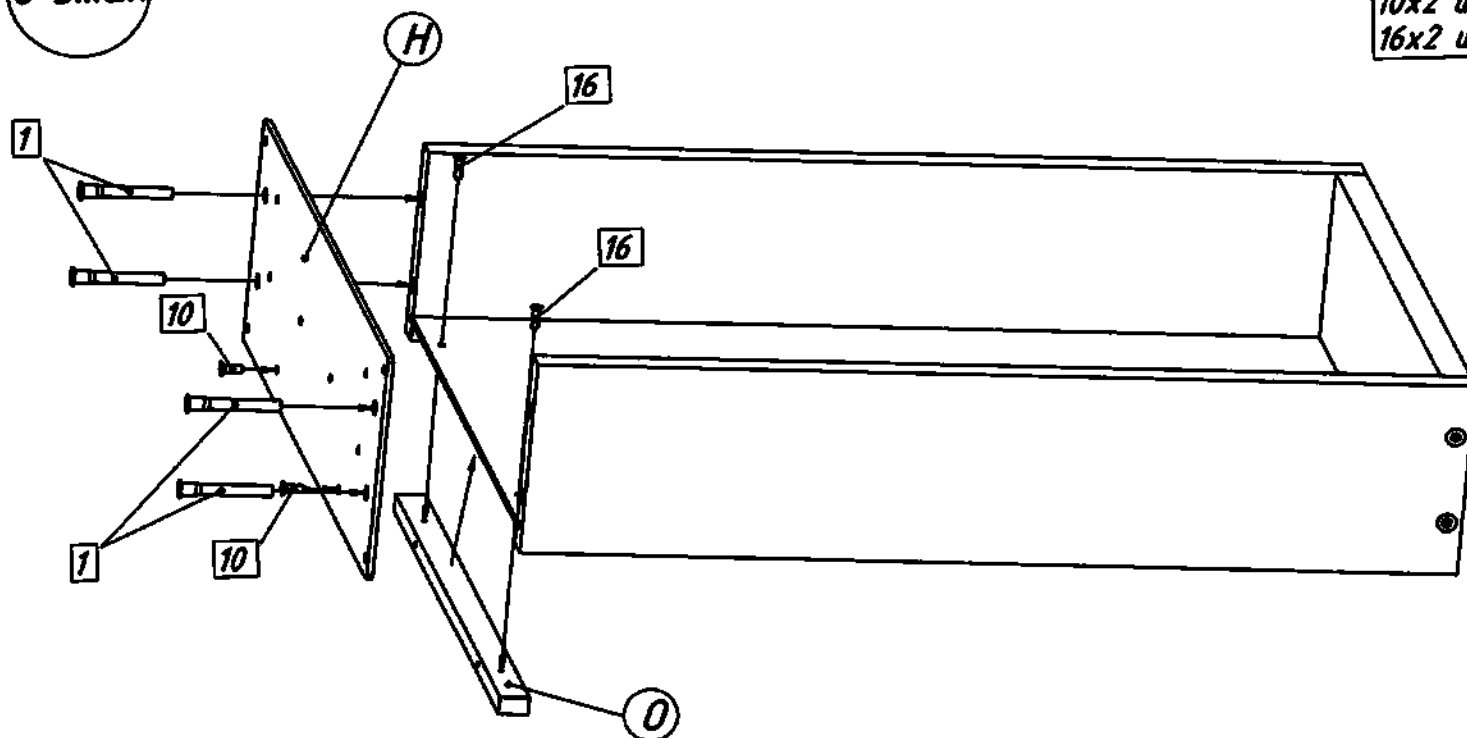

Произведите установку малого фасада на 2 верхних ящика

9 этап


Лх1 шт.
7х1 шт.
8х2 шт.
10х8 шт.
11х10 шт.

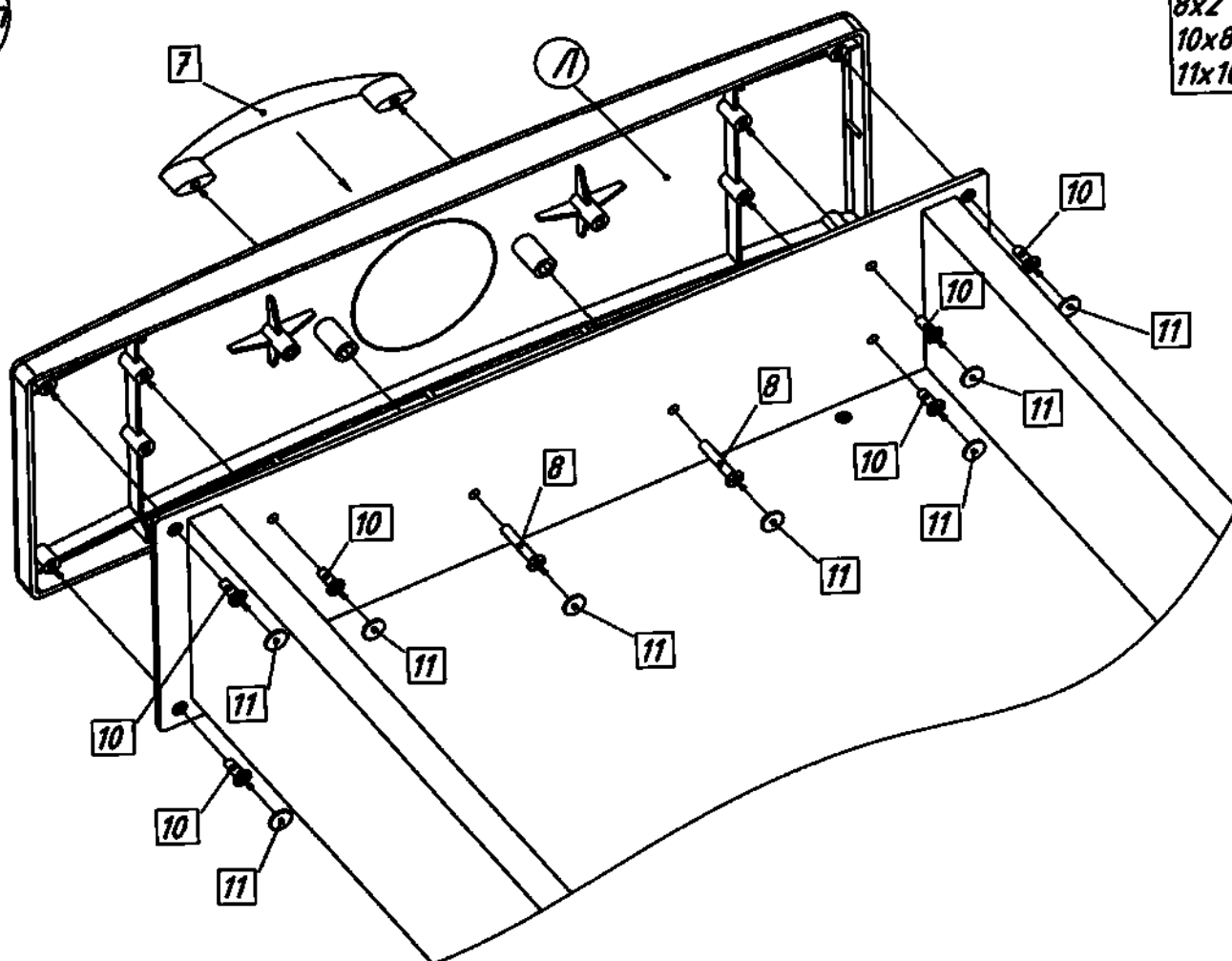

ОМ 29.1440.00 Произведите установку направляющих 2-х верхних ящиков

15/2x2 шт.
16x6 шт.


10 этап

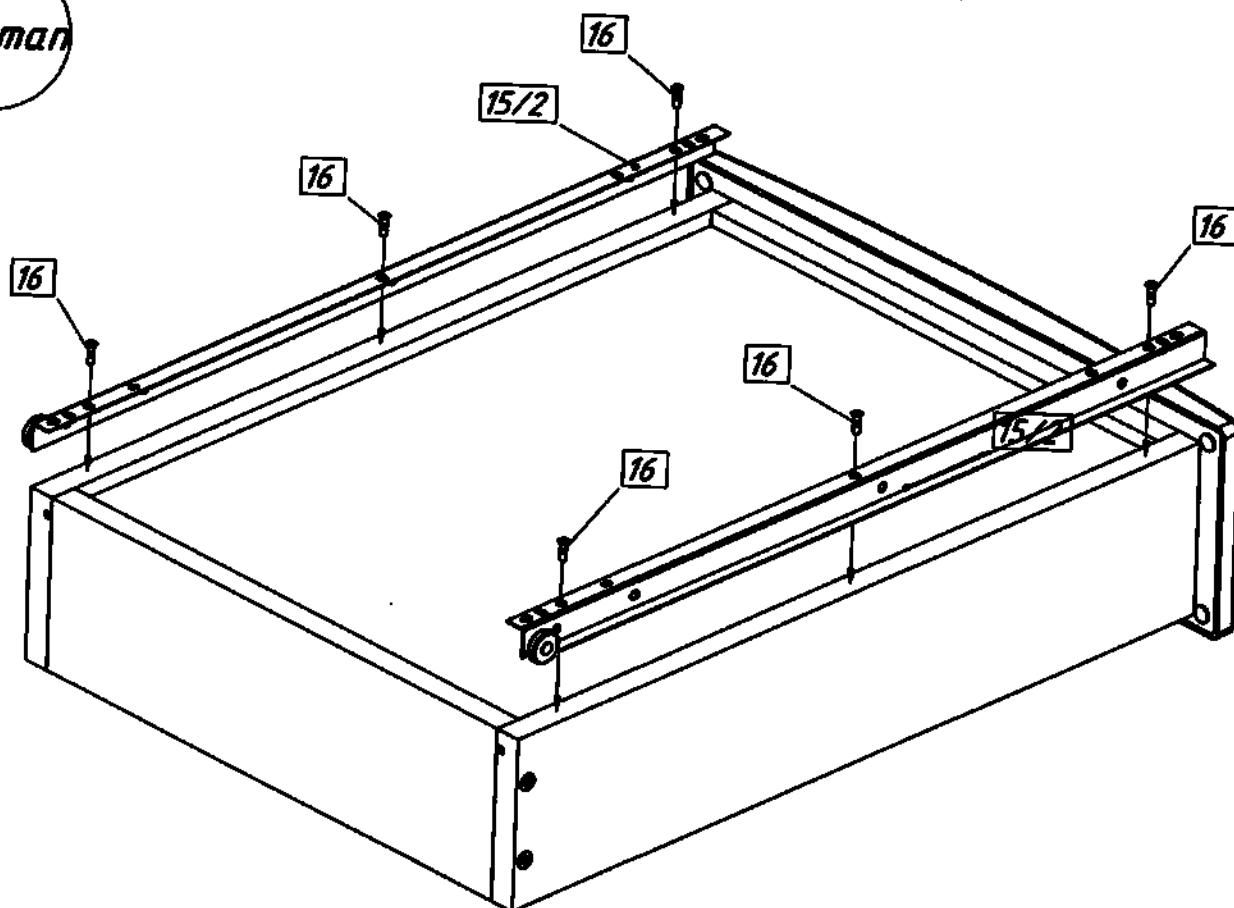

11 этап


Произведите установку большой стенки фасада ящика

Mx1 шт.
Ox1 шт.
1x4 шт.
10x2 шт.
16x2 шт.

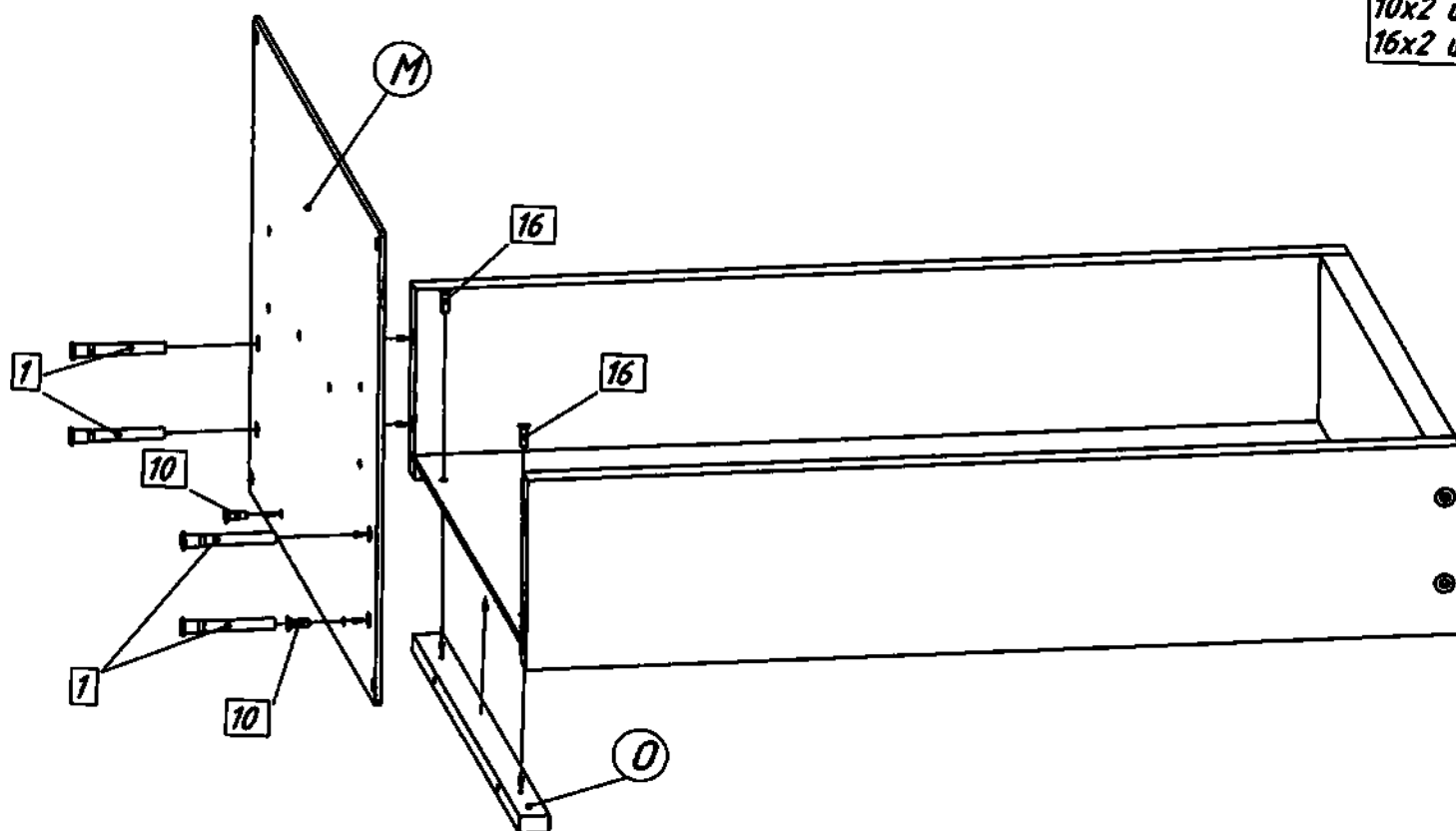

ОМ 29.1440.00
12 этап


Произведите установку большого фасада ящика

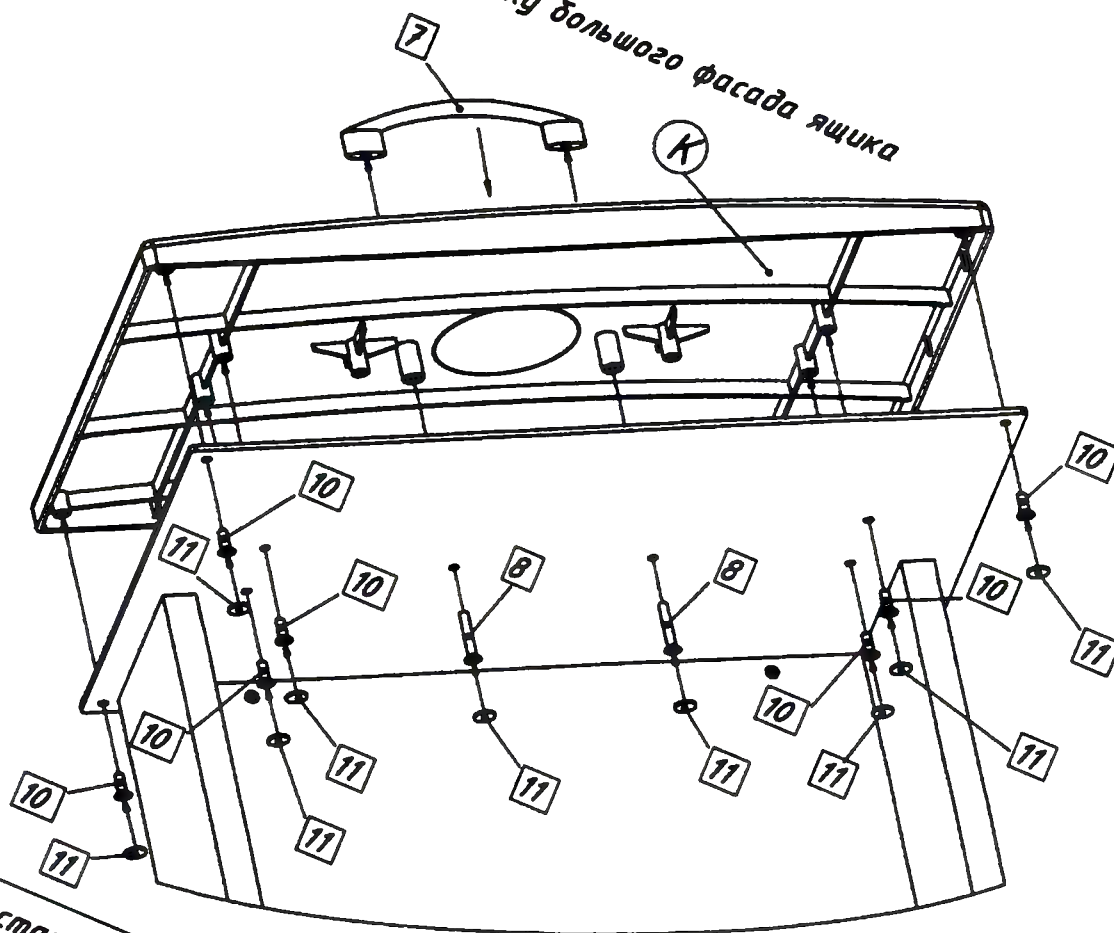

Кх1 шт.
7х1 шт.
8х2 шт.
10х8 шт.
11х10 шт.



13 этап

Произведите установку направляющих нижнего ящика

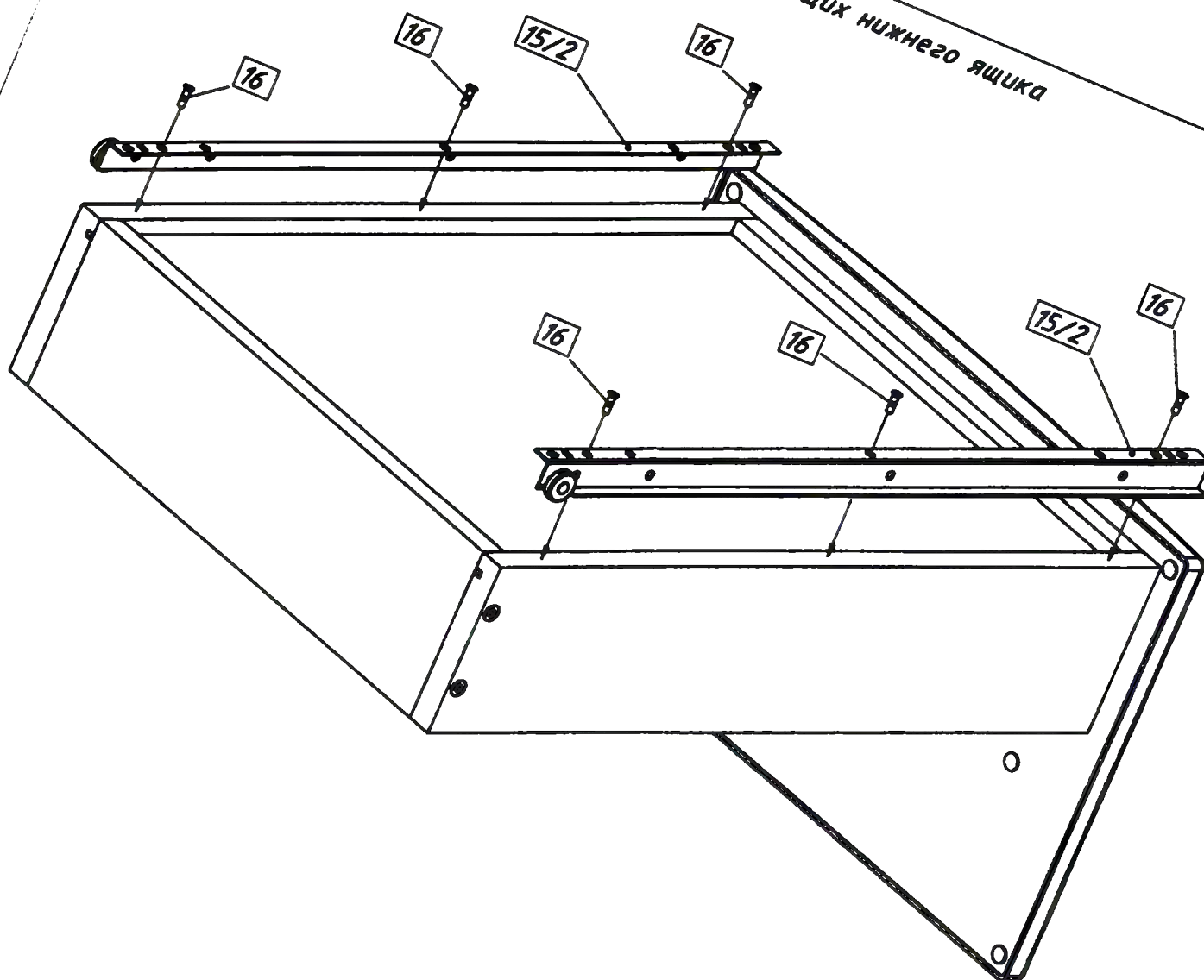

15/2х2 шт.
16х6 шт.


14 этап

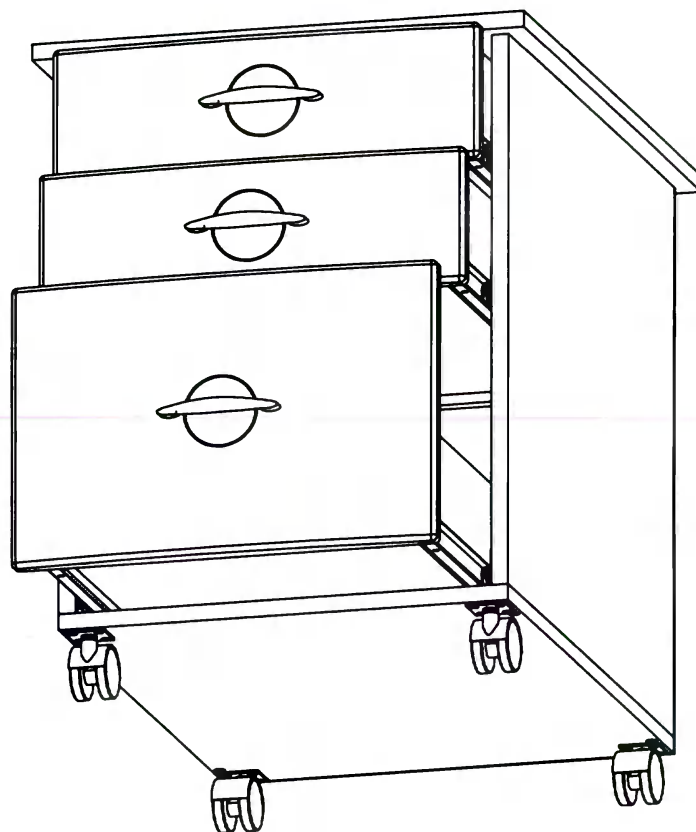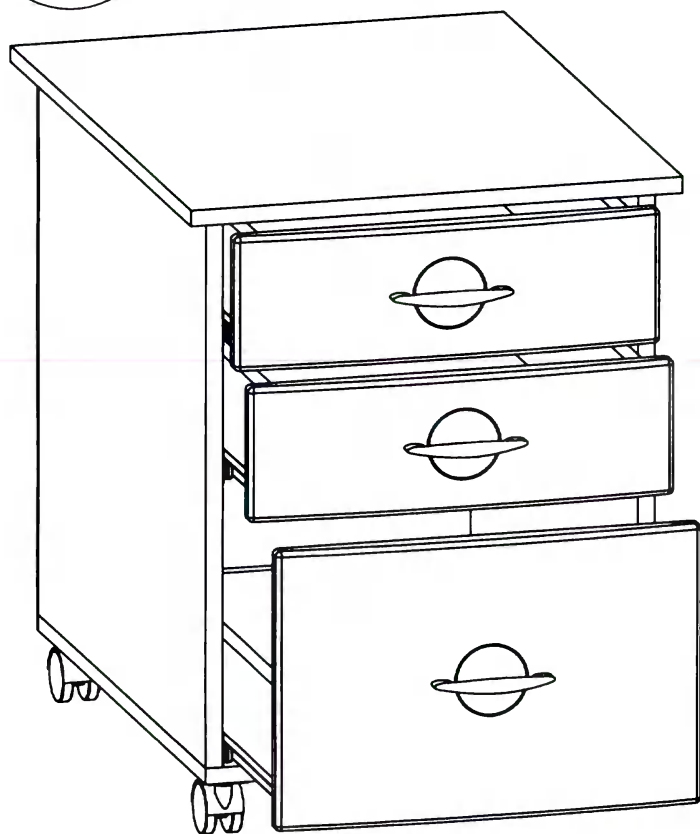

15 этап


Произведите сборку левой стенки стола

Сх1 шт.
3х2 шт.
4х2 шт.
12х2 шт.

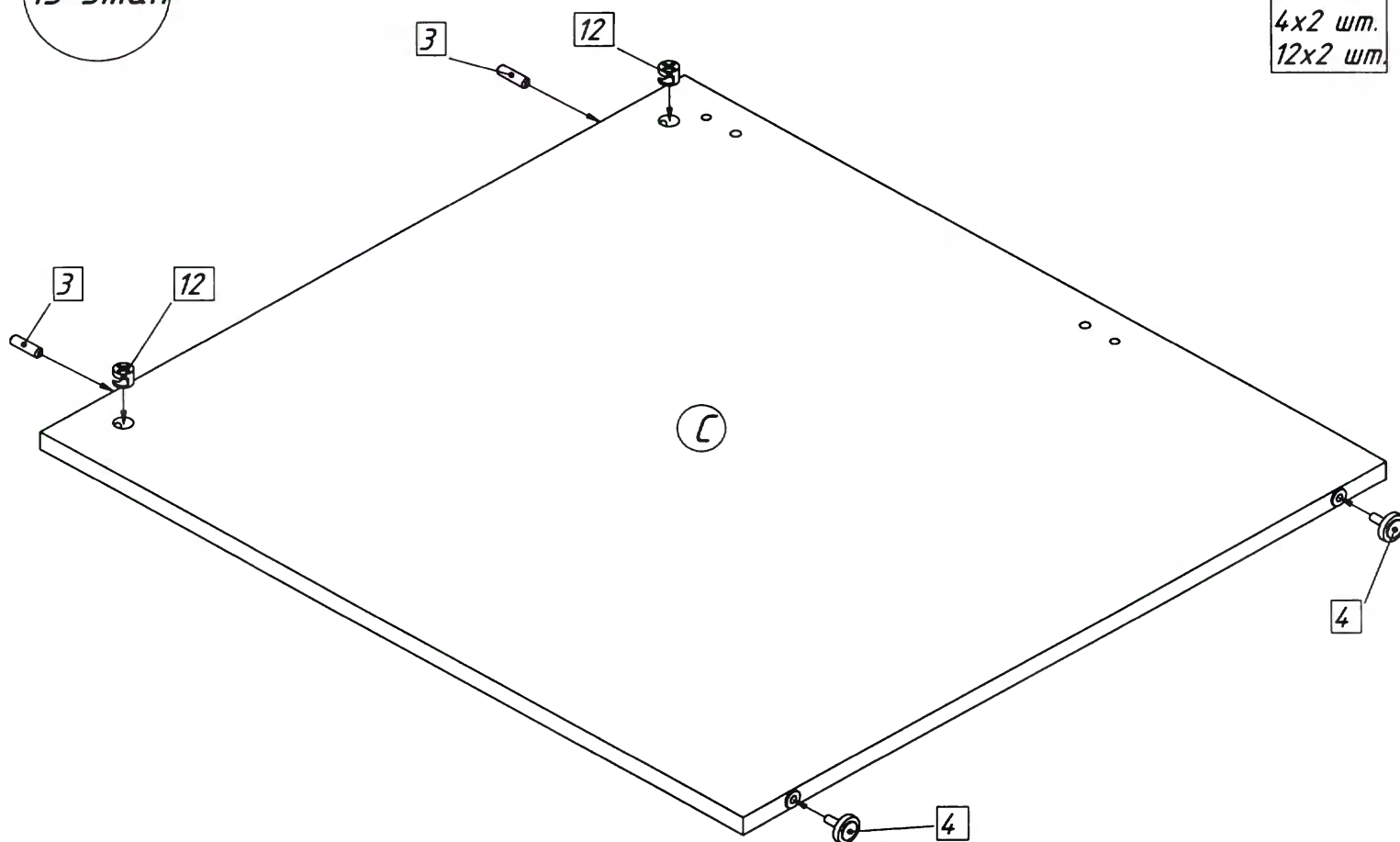

16 этап


7x1 шт.
3x2 шт.
4x2 шт.
12x2 шт.

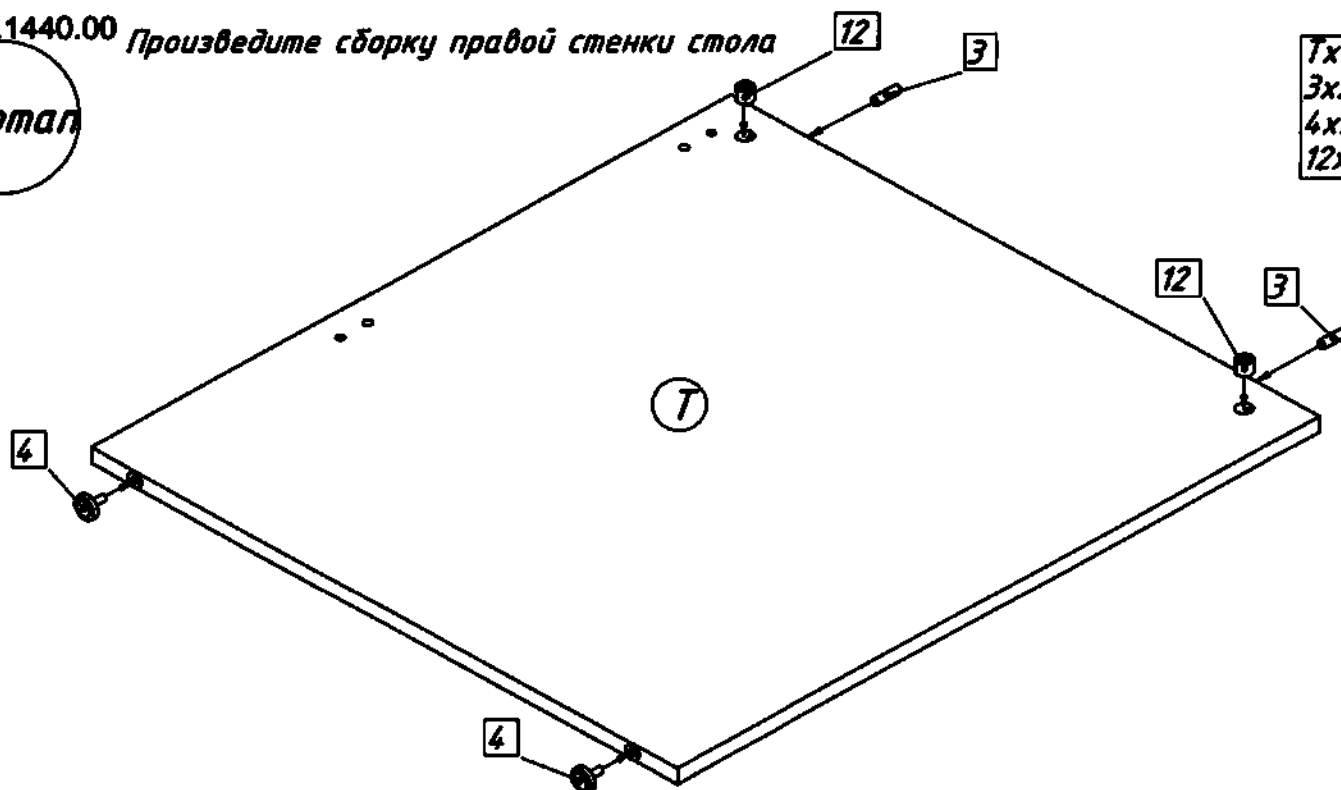

Произведите сборку столешницы стола

17 этап


11x1 шт.
13x4 шт.

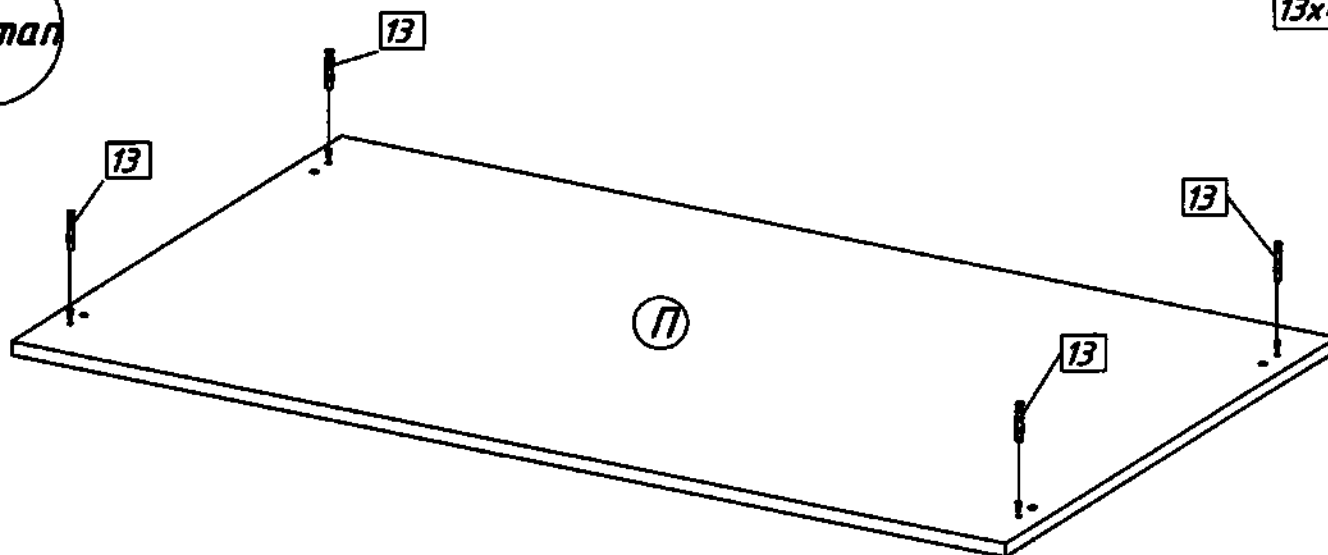



Произведите сборку стенки стола задней



18 этап

Рx1 шт.
3x4 шт.

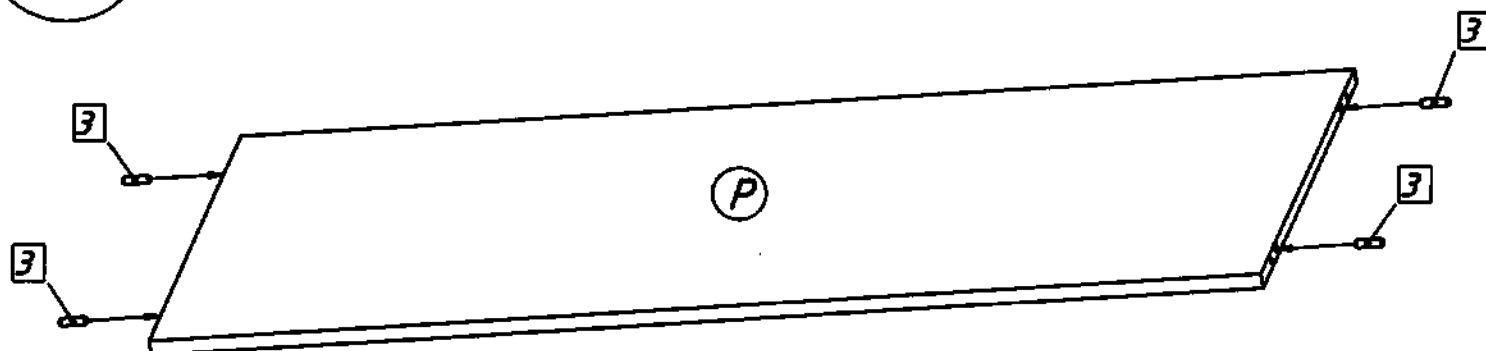

19 этап

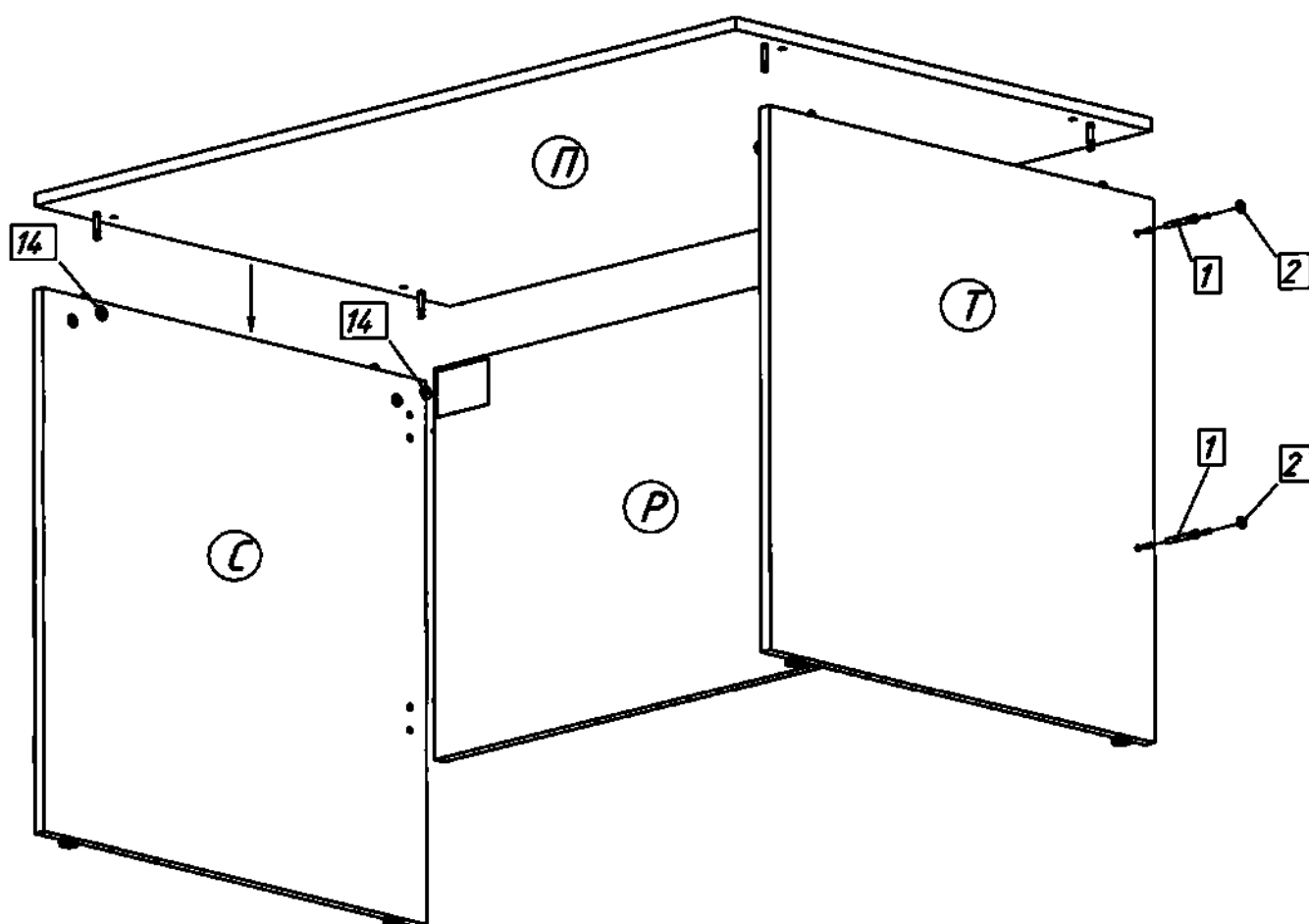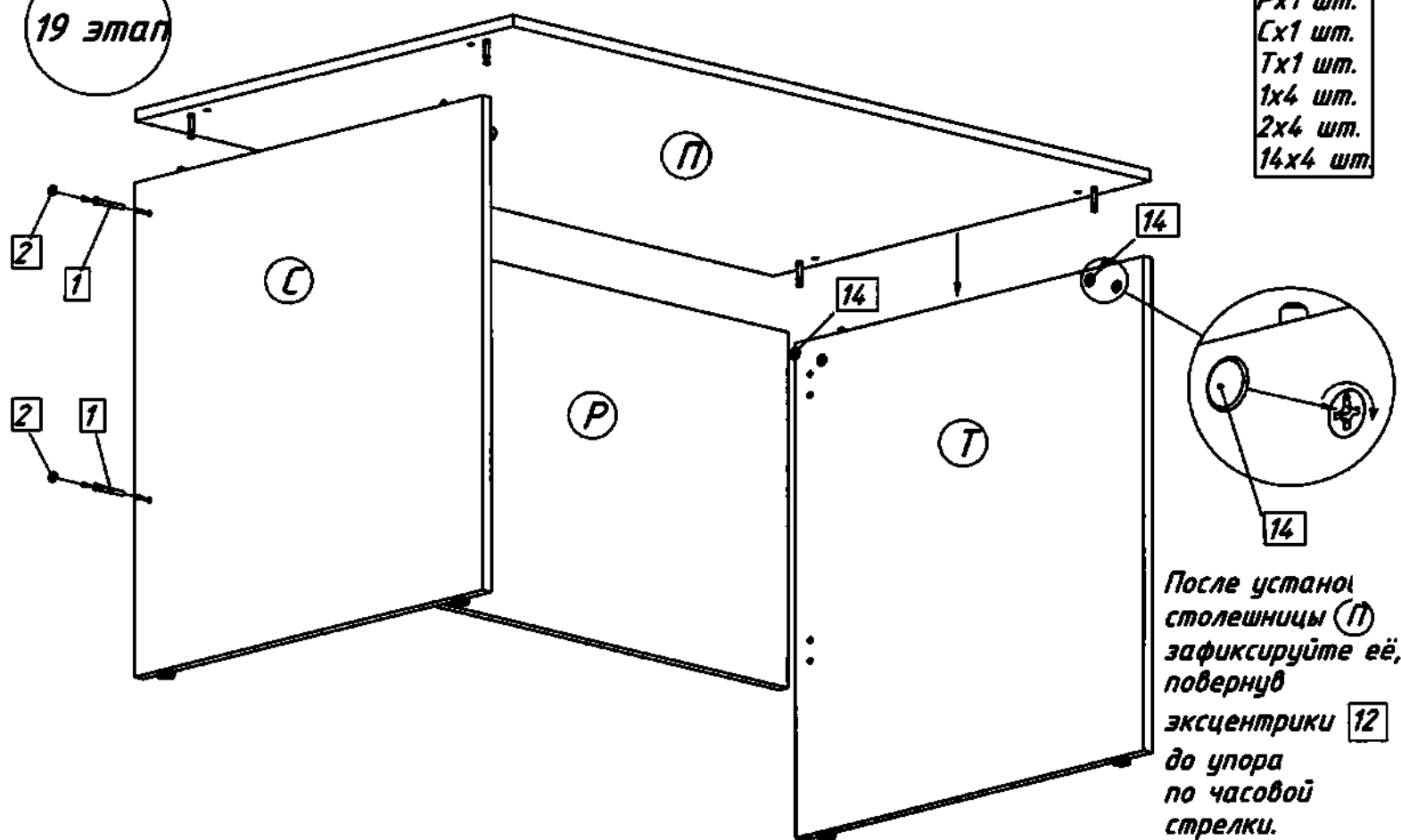


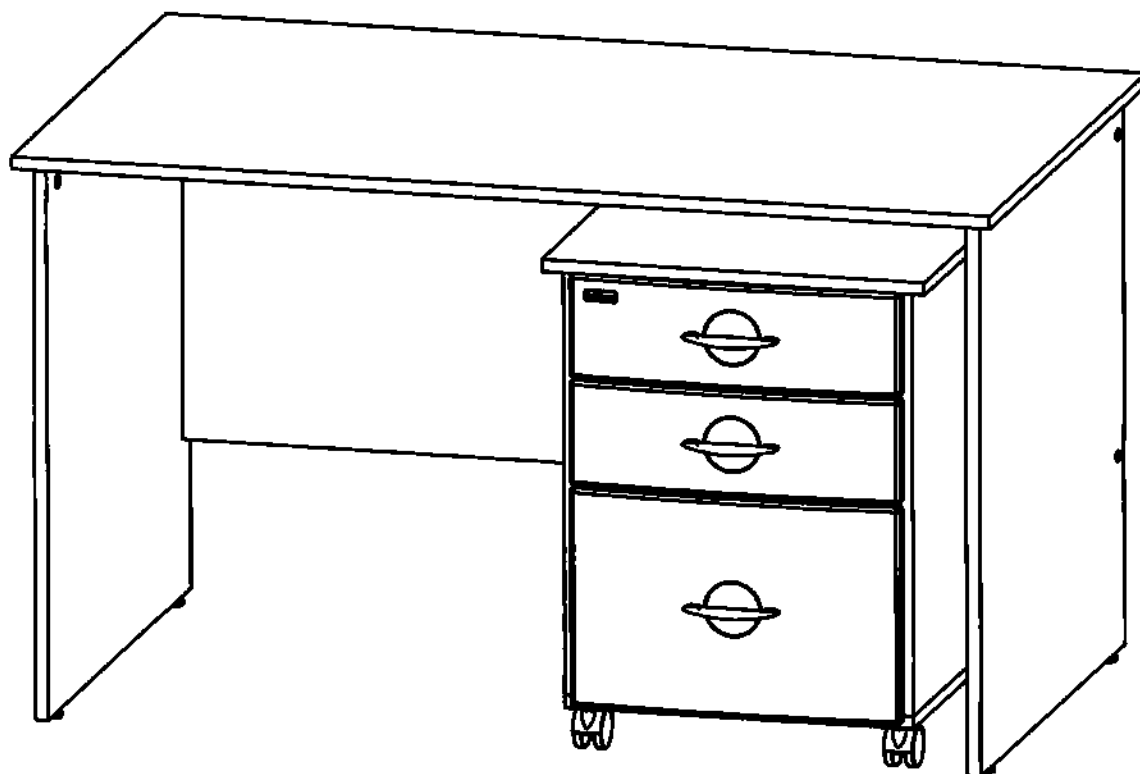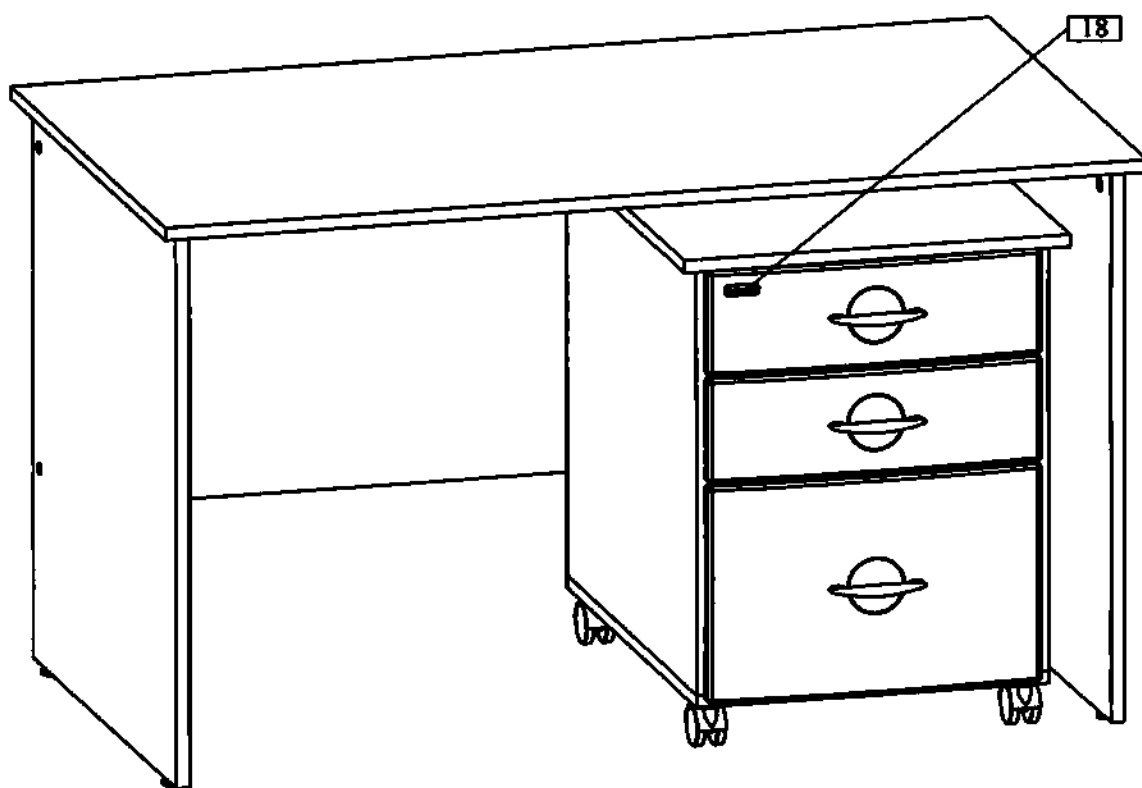

Инструкция по сборке изделия

Стол медицинские по ГИКС.942818.114 ТУ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.6)

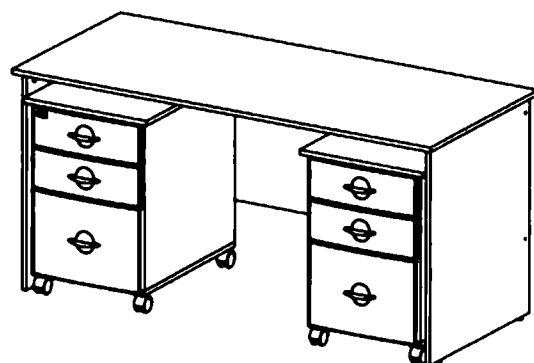

Условные обозначения:

1. А-Т : детали

2. 1 - 18 : крепёж и фурнитура

3. 1 - 18 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол - во
А	Стенка тумбы левая	2
Б	Стенка тумбы правая	2
В	Крышка тумбы	2
Г	Дно тумбы	2
Д	Стенка задняя тумбы	2
Е	Задняя стенка ящика	6
Ж	Правая стенка ящика	6
З	Левая стенка ящика	6
И	Дно ящика	6
К	Фасад ящика большого	2
Л	Фасад ящика малого	4
М	Стенка большого ящика	2
Н	Стенка малого ящика	4
П	Столешница	1
Р	Задняя стенка стола	1
С	Левая стенка стола	1
Т	Правая стенка стола	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	60	Саморез 3,5x13	
2	48	Саморез 4x12	
3	32	Саморез 3,5x19	
4	4	Заглушка для евровинта	
5	12	Винт М4х25	
6	14	Эксцентрик	
7	14	Шток эксцентрика	
8	6	Заглушка эксцентрика	
9	6	Ручка мебельная	
10	60	Заглушка самоклеющаяся	
11	36	Шкант	
12*	1	Ключ шестигранник	
13	60	Евровинт	


Арт.	Кол - во	Обозначение	
14	6 комплектов	Направляющие	14/1 14/2
15	40	Гвоздь 1,6x25	
16	8	Опора колёсная	
17	4	Ножка	
18	1	Логотип компании	БЛАМЕД

* Евровинты 13 закручивать ключом шестигранником 12 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления.


1 этап

Схема сборки изделия


Произведите сборку тумбы.

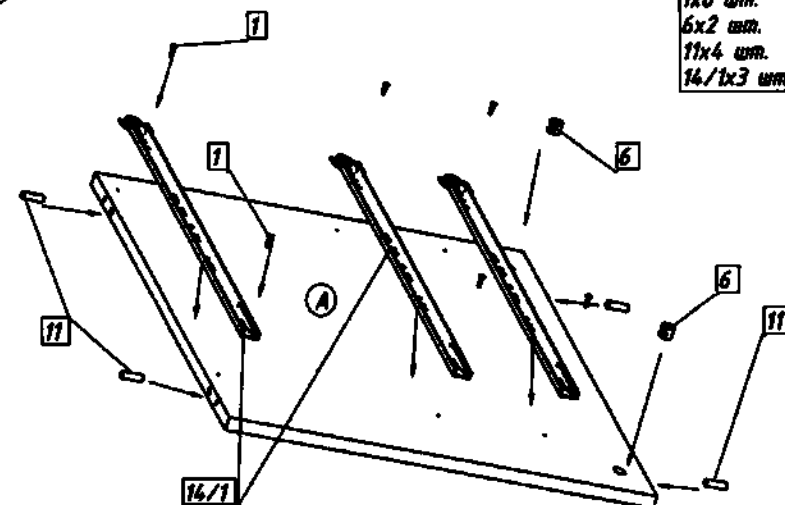


2 этап

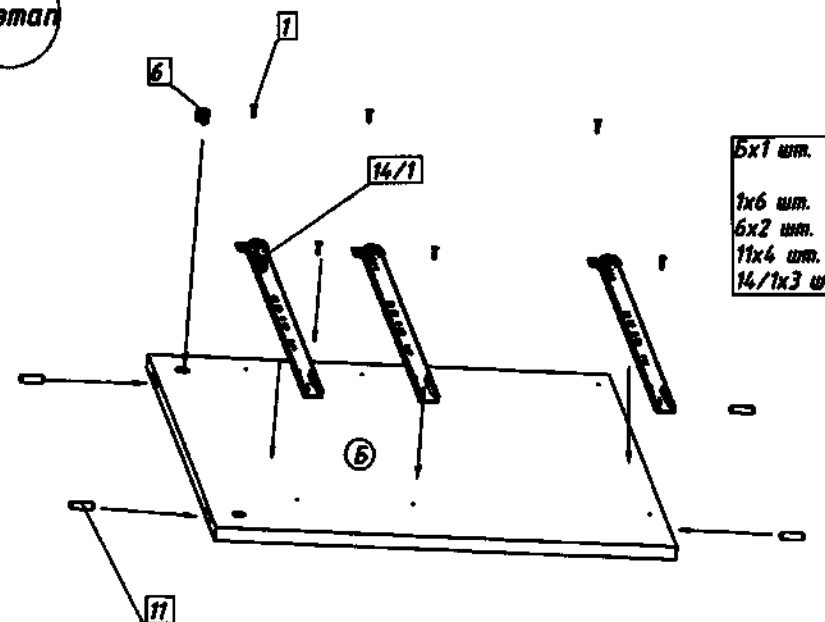

3 этап

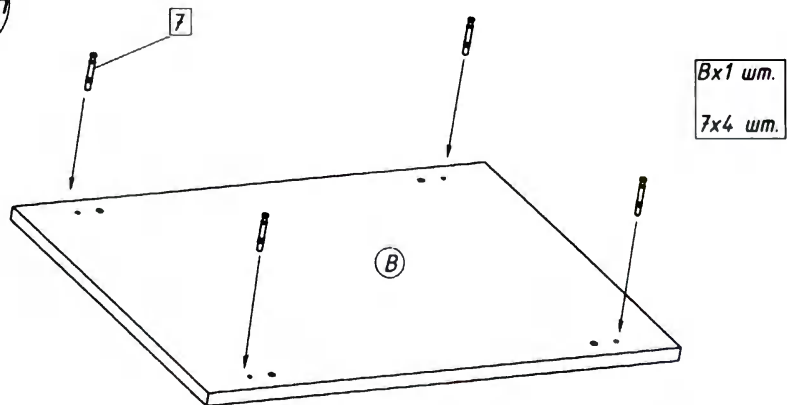


4 этап

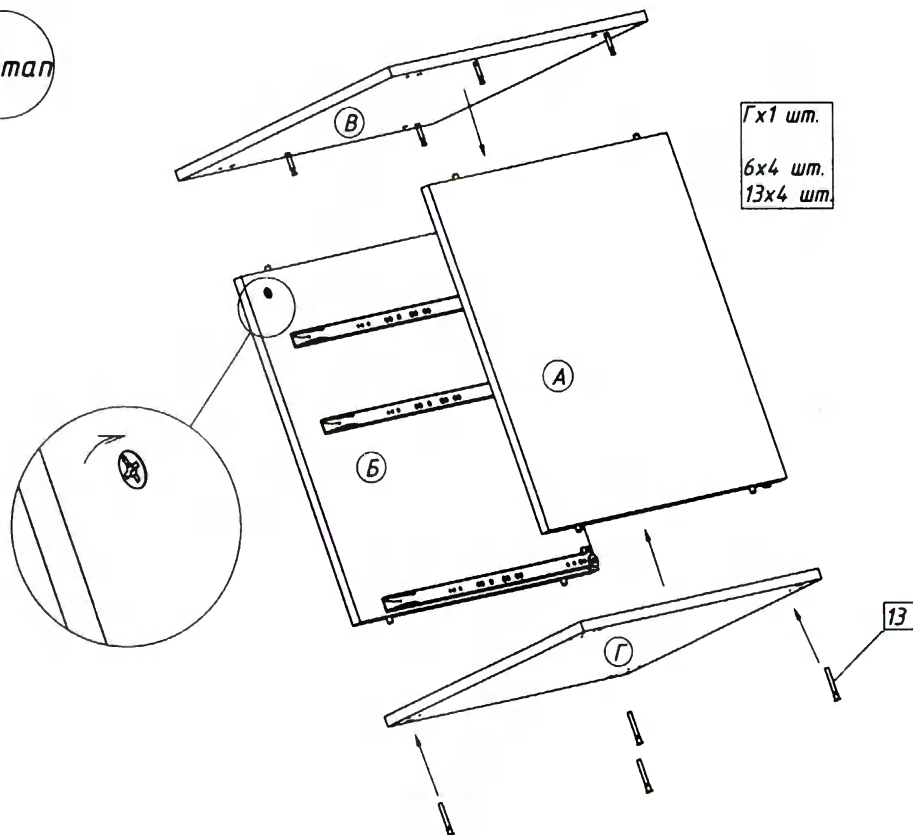

После установки эксцентриков 6 установить на них заглушки 8.

5


5 этап

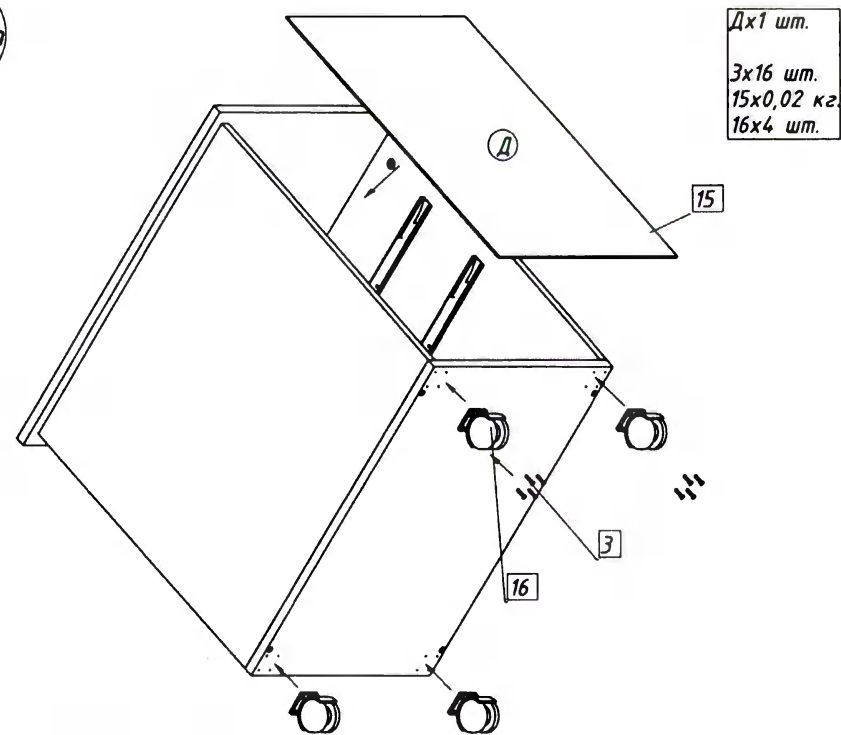

Стенку D крепить гвоздями 15.


Соберите шесть задних стенки ящика.

6 этап

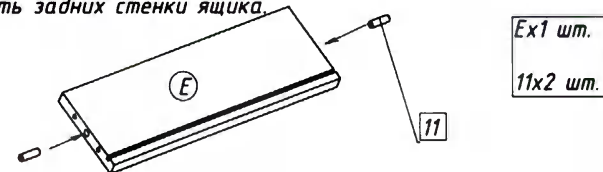

Соберите шесть каркасов для ящиков.


7 этап

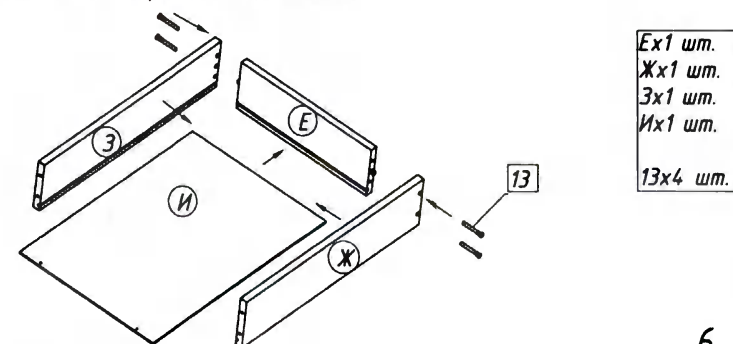


6

Выполните сборку двух больших ящиков.

8 этап

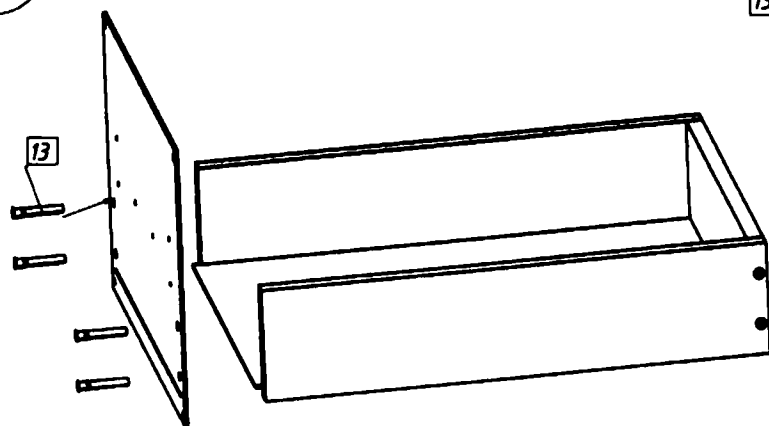
Mx1 шт.
13x4 шт.

9 этап

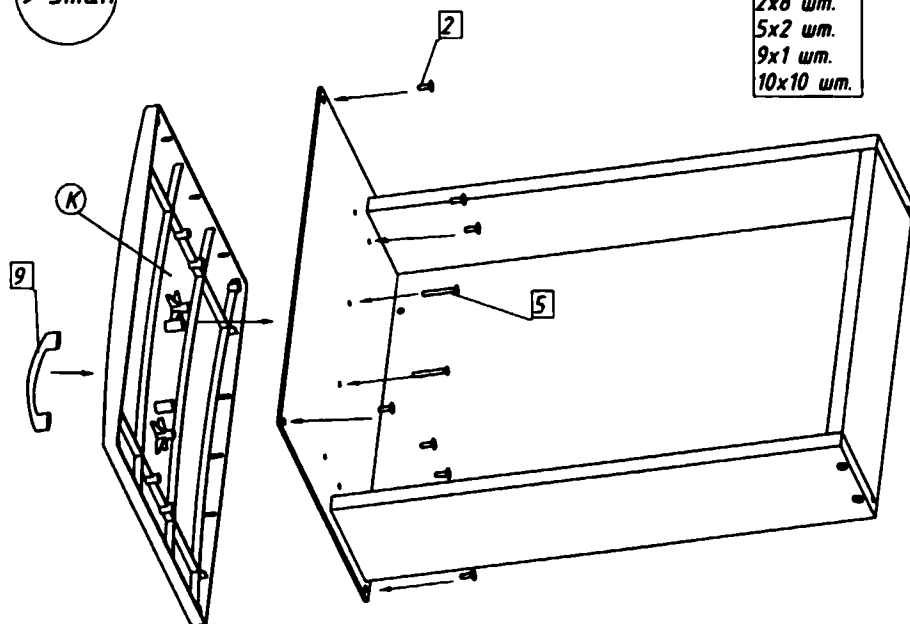Kx1 шт.
2x8 шт.
5x2 шт.
9x1 шт.
10x10 шт.


После установки винтов [5] и саморезов [2] наклейте на них заглушки [10].

10 этап

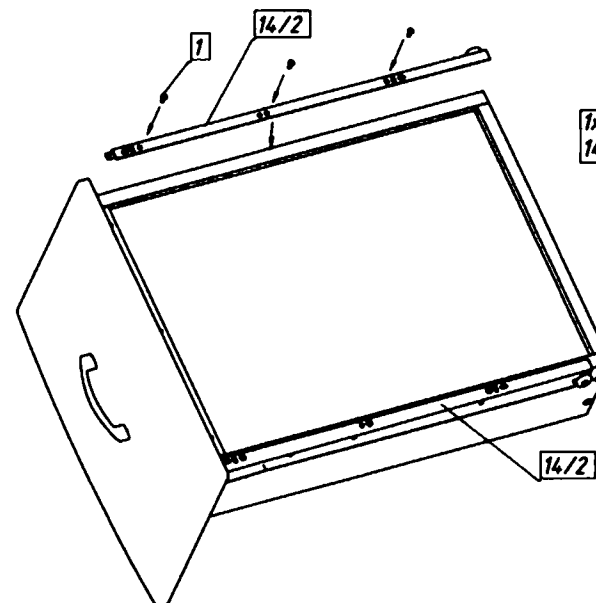
1x6 шт.
14/2x2 шт.

Аналогично соберите четыре малых ящика.

11 этап

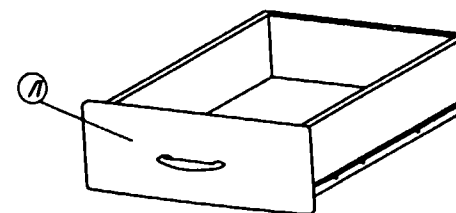Лx1 шт.
Нx1 шт.


12 этап

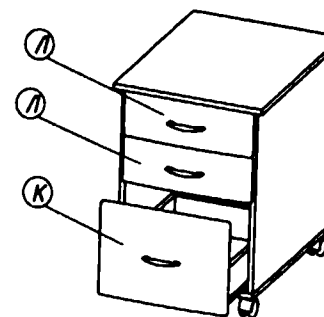


Аналогично соберите вторую тумбу.

Произведите сборку стола.


13 этап

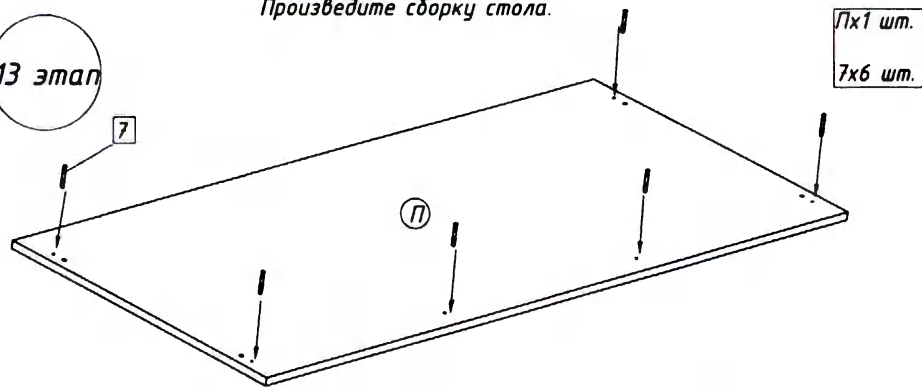


14 этап

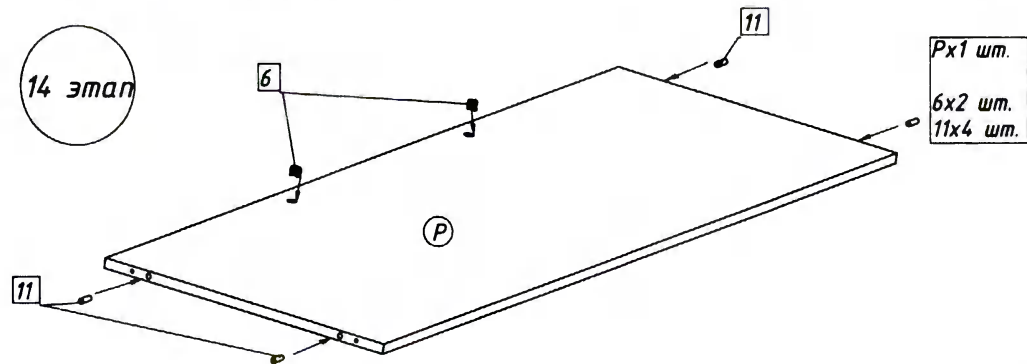


15 этап

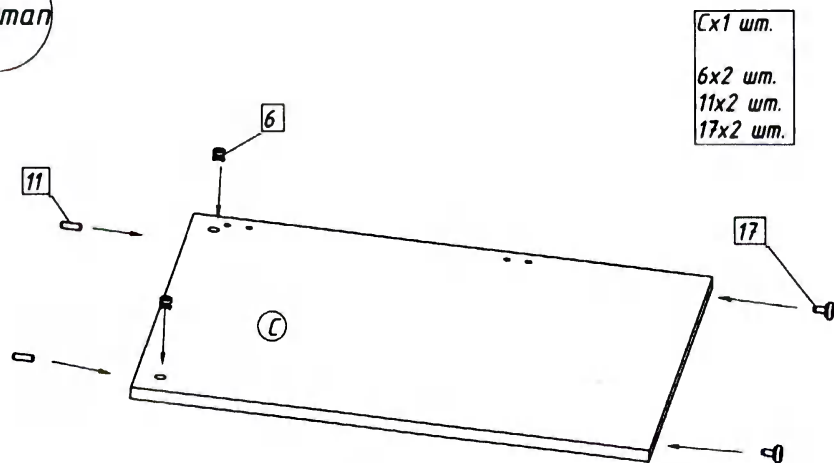

16 этап

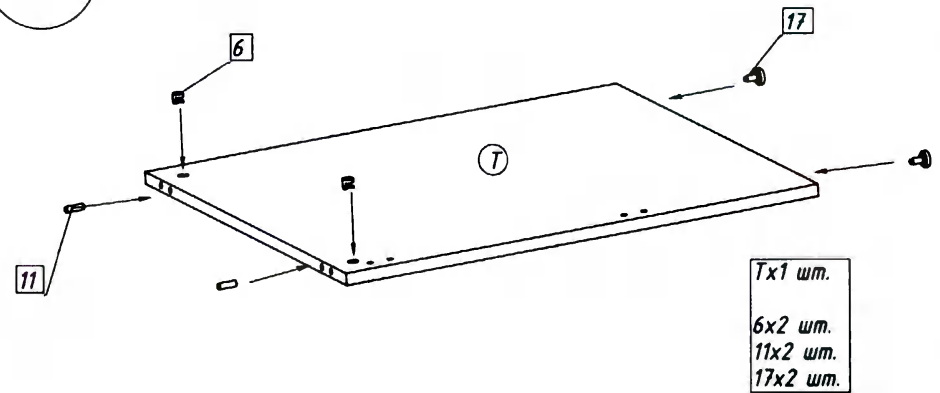


17 этап

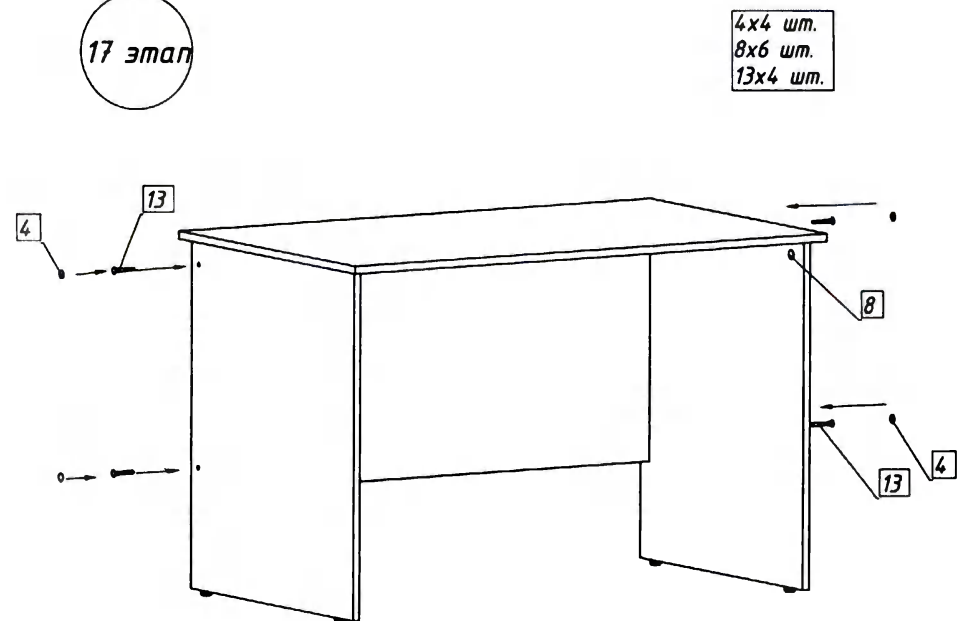


18 этап

Наклейте на верхний ящик левой тумбы
самоклеющийся логотип компании 18


18х1 шт.

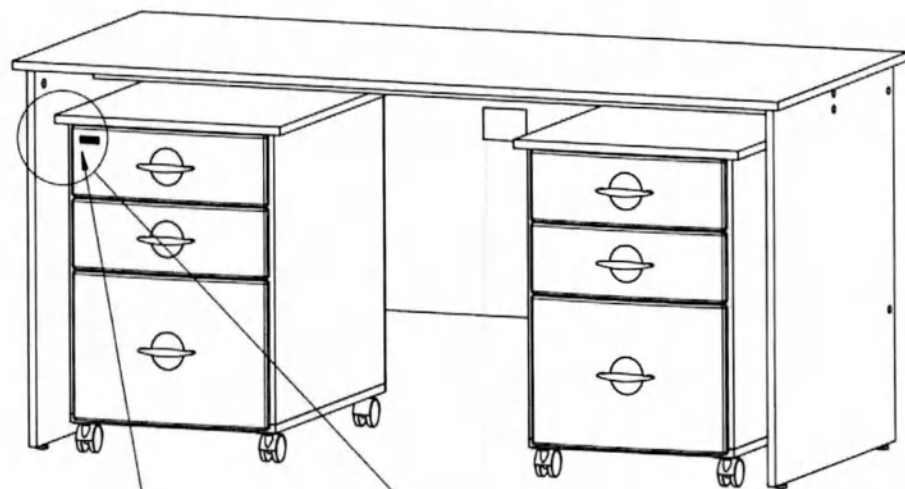

Сборка изделия завершена

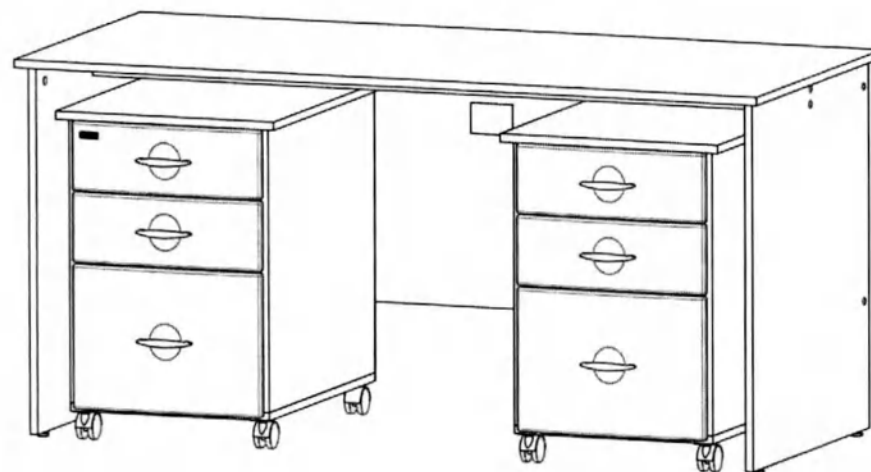

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942818.114 ТУ
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.7)

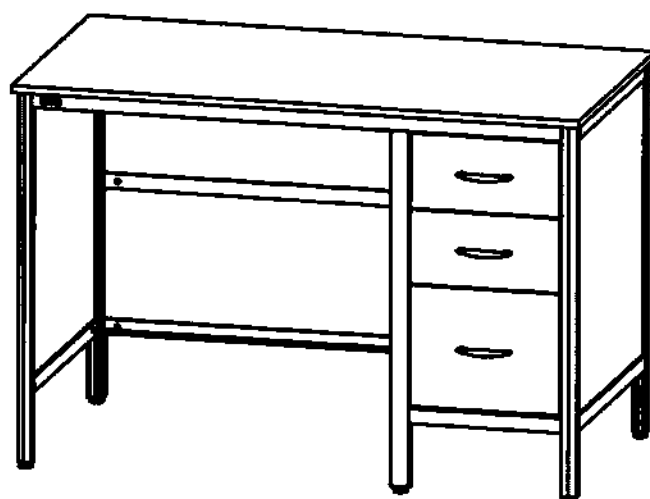

Словные обозначения:

.. А-Ш: детали

2. [1] - [16] : крепёж и фурнитура


3. (1) - (26) : этапы сборки

Код товара: _____

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон нижний передний	1
Д	Прогон нижний задний	1
Е	Стойка передняя	1
Ж	Стойка задняя	1
З	Стенка задняя левая	2
И	Стенка задняя правая	1
К	Прогон задний левый	1
Л	Прогон верхний задний левый	1
М	Прогон верхний задний правый	1
Н	Перегородка	1
О	Прогон верхний передний	1
П	Стенка задняя выдвижного ящика	2
Р	Стенка левая выдвижного ящика	2
С	Стенка правая выдвижного ящика	2
Т	Планка выдвижного ящика	3
У	Дно выдвижного ящика	3
Ф	Фасад выдвижного ящика	2
Х	Стенка задняя выдвижного ящика	1
Ц	Стенка левая выдвижного ящика	1
Ч	Стенка правая выдвижного ящика	1
Ш	Фасад выдвижного ящика	1

Крепёж и фурнитура

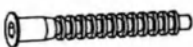Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4	Евровинт 6,3х13	
3	18	Конфирмат	
4	5	Опора	
5	1	Логотип компании	
6	6	Саморез 3х20	
7	6	Площадка под направляющие	
8	30	Саморез 3х12	
9	3 комплекта	Направляющие	 9 /1  9/2
10	18	Шкант мебельный	
11	3 комплекта	Ручка мебельная	 11/1  11/2
12	-	Заглушка декоративная	
13	6	Шток эксцентрика	
14	6	Эксцентрик	
15	6	Заглушка эксцентрика	
16	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы 3 закручивать ключом шестигранником 16 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия



Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

1 этап

Произведите сборку стенки левой

5х1 шт.

12х1 шт.

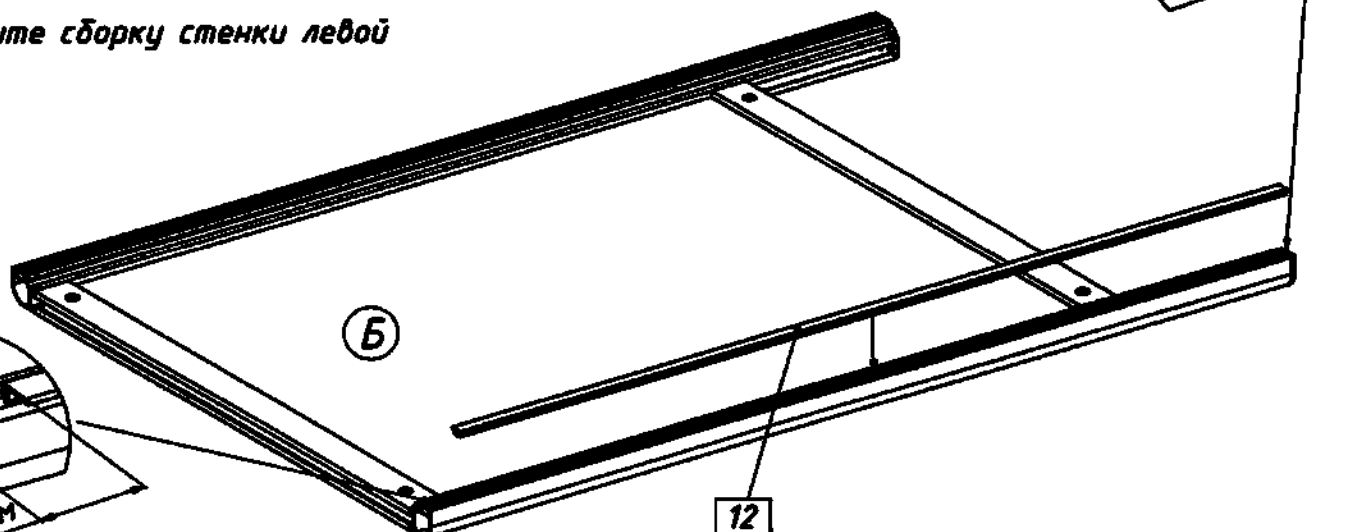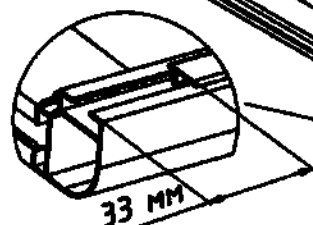**2 этап**

Произведите сборку стенки правой

5х1 шт.


6х3 шт.

7х3 шт.

8х6 шт.

9/2х3 шт.

12х1 шт.


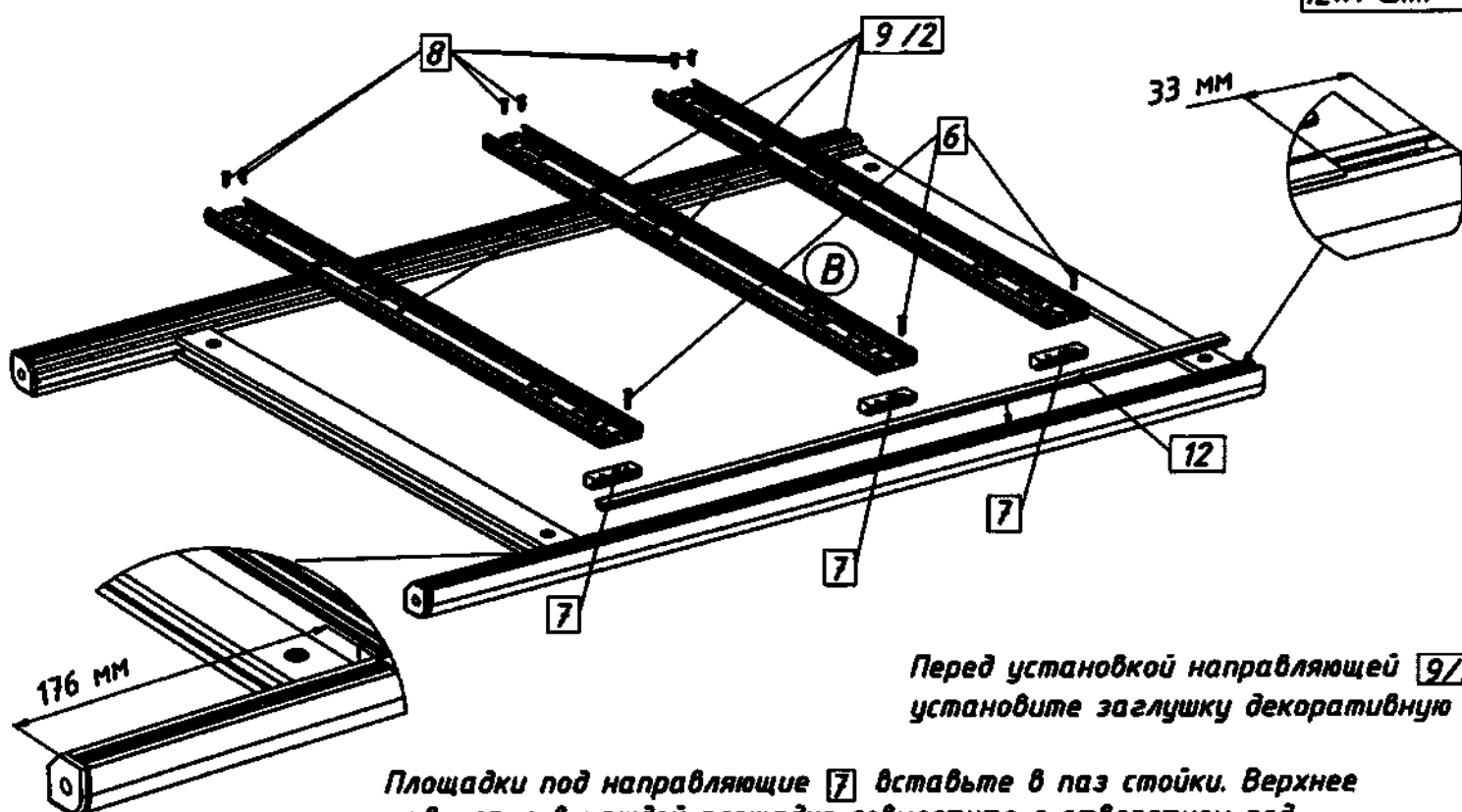


Перед установкой направляющей [9/2] установите заглушку декоративную [12]

Площадки под направляющие [7] вставьте в паз стойки. Верхнее отверстие в каждой площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.

3 этап

Схема установки заглушек 12 в стойку

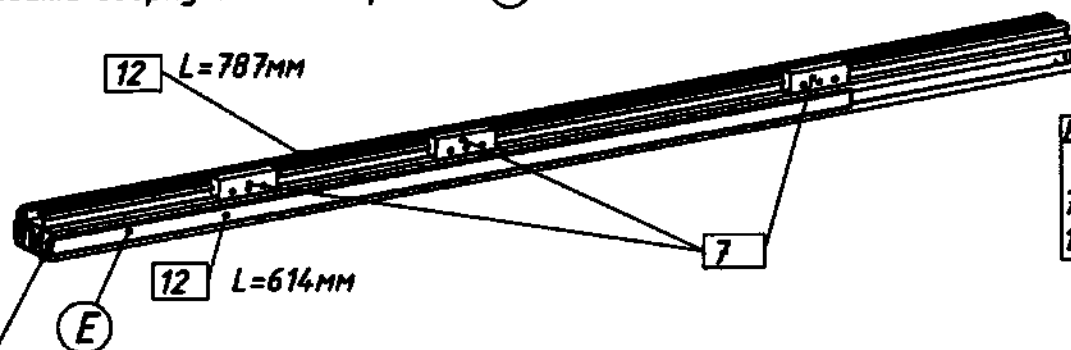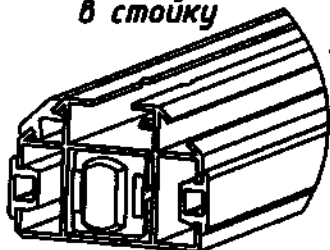

Площадки под направляющие 7 вставьте в паз стойки. Верхнее отверстие в каждой площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.


Произведите сборку прогона переднего нижнего (Г)

4 этап

Схема установки заглушек 12



Гx1 шт.
12x1 шт.

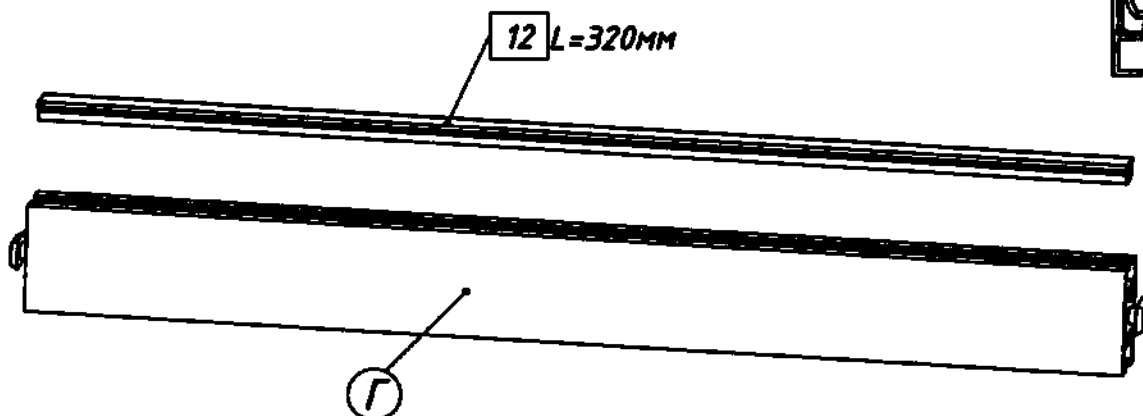

Произведите сборку прогона переднего верхнего (Н)

5 этап

Нx1 шт.
12x2 шт.


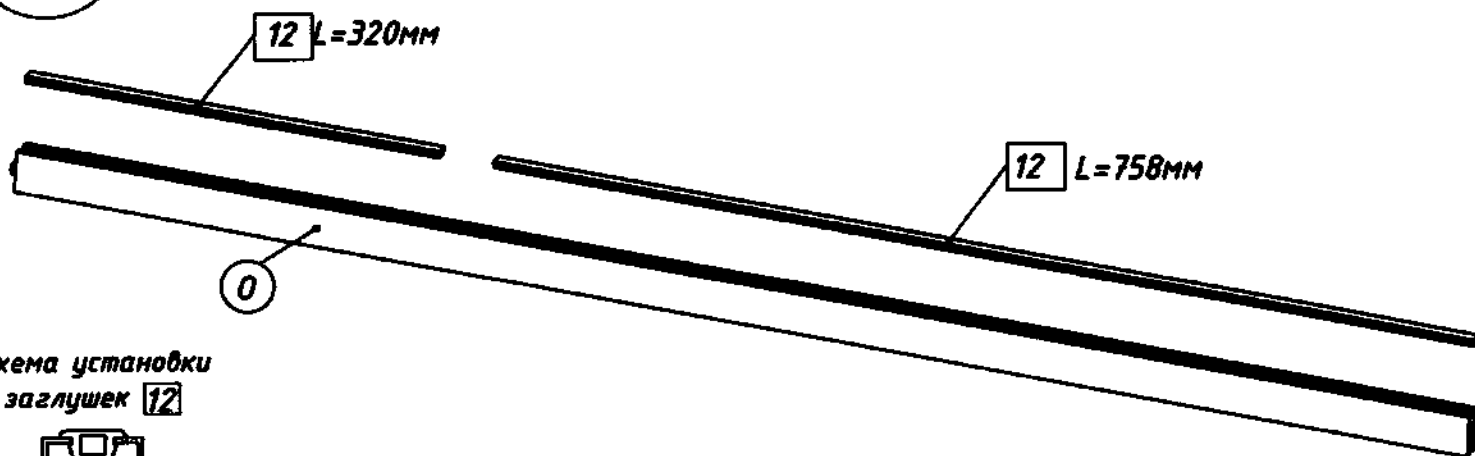



Схема установки заглушек 12

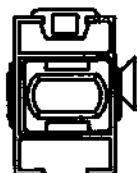

6 этап


Ослабьте замки в прогоне нижнем заднем (Д) с помощью ключа [16]. Вставьте прогоны в стенки (Б) и (В). После этого поверните прогоны на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков прогонов находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Бх1 шт.
Вх1 шт.
Дх1 шт.

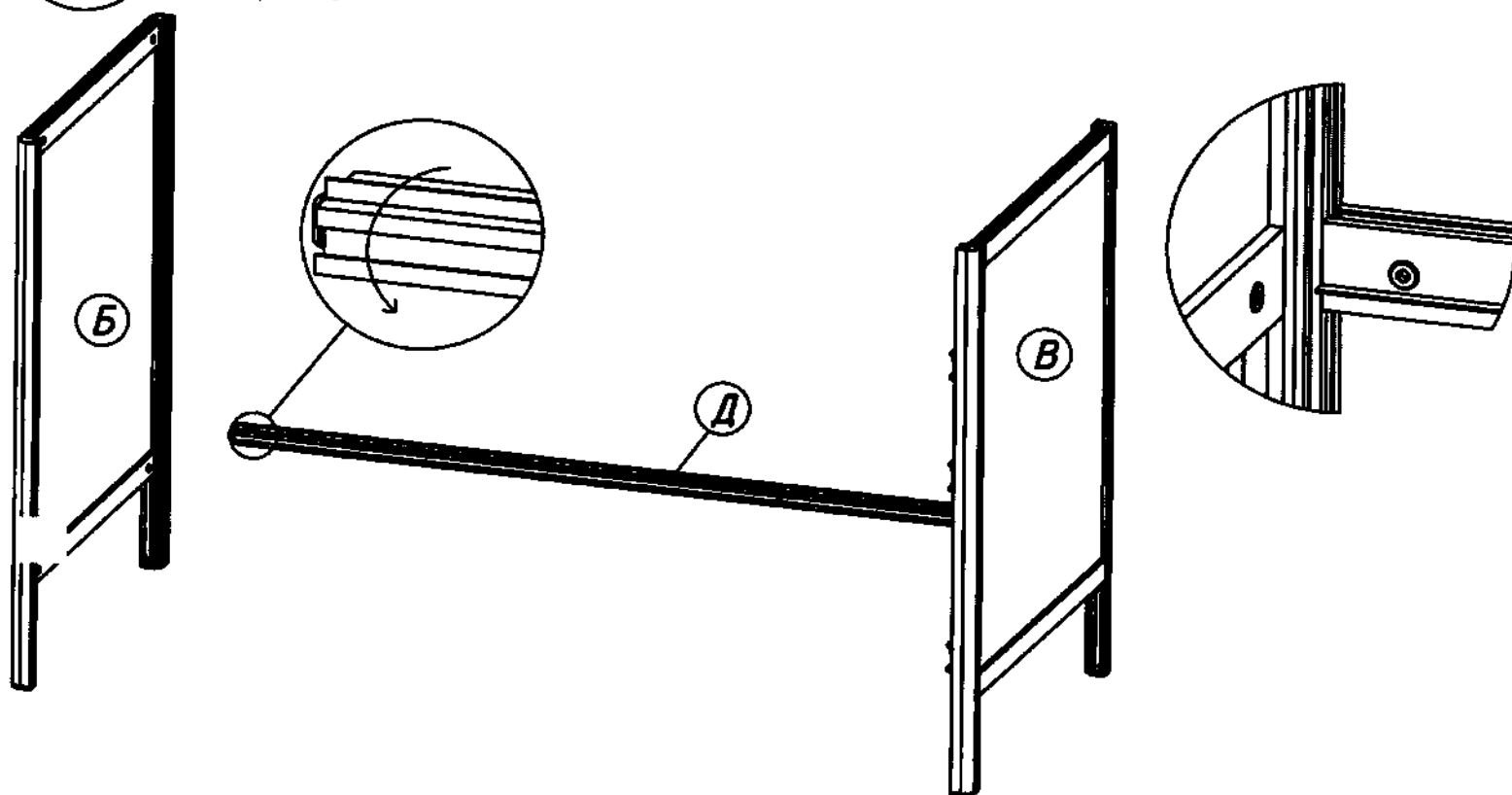

7 этап


Ослабьте замок в стойке задней (Ж) с помощью ключа [16]. Вставьте стойку по центру прогона (Д) и после этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винт замка стойки находился с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винт замка стойки, но не до полной фиксации, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки (Ж) при установке стенок задних.

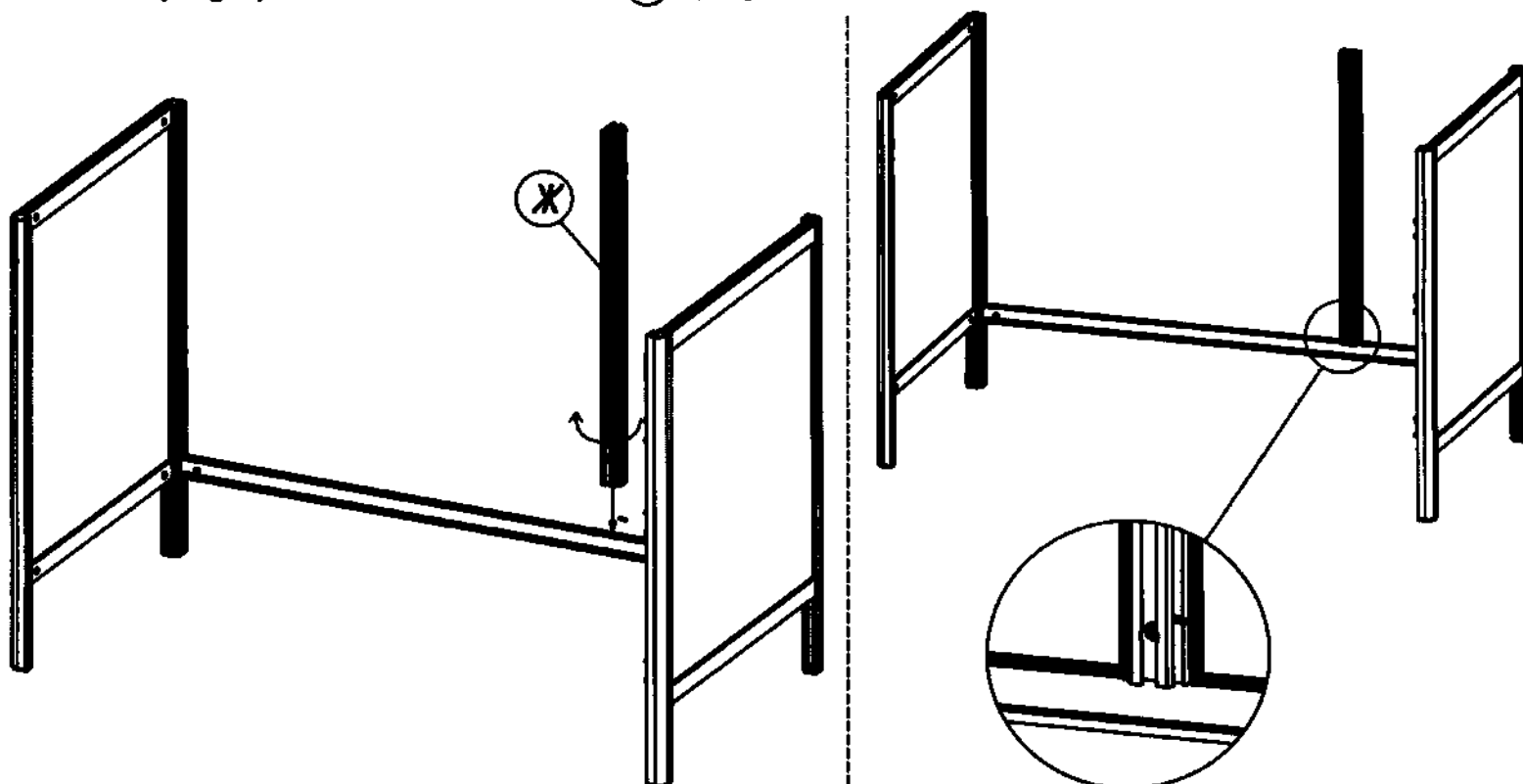

Произведите установку прогона верхнего переднего ① таким образом, чтобы винты замков прогона ① находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона ①, тем самым зафиксировав его на стенках.

0x1 шт.


8 этап

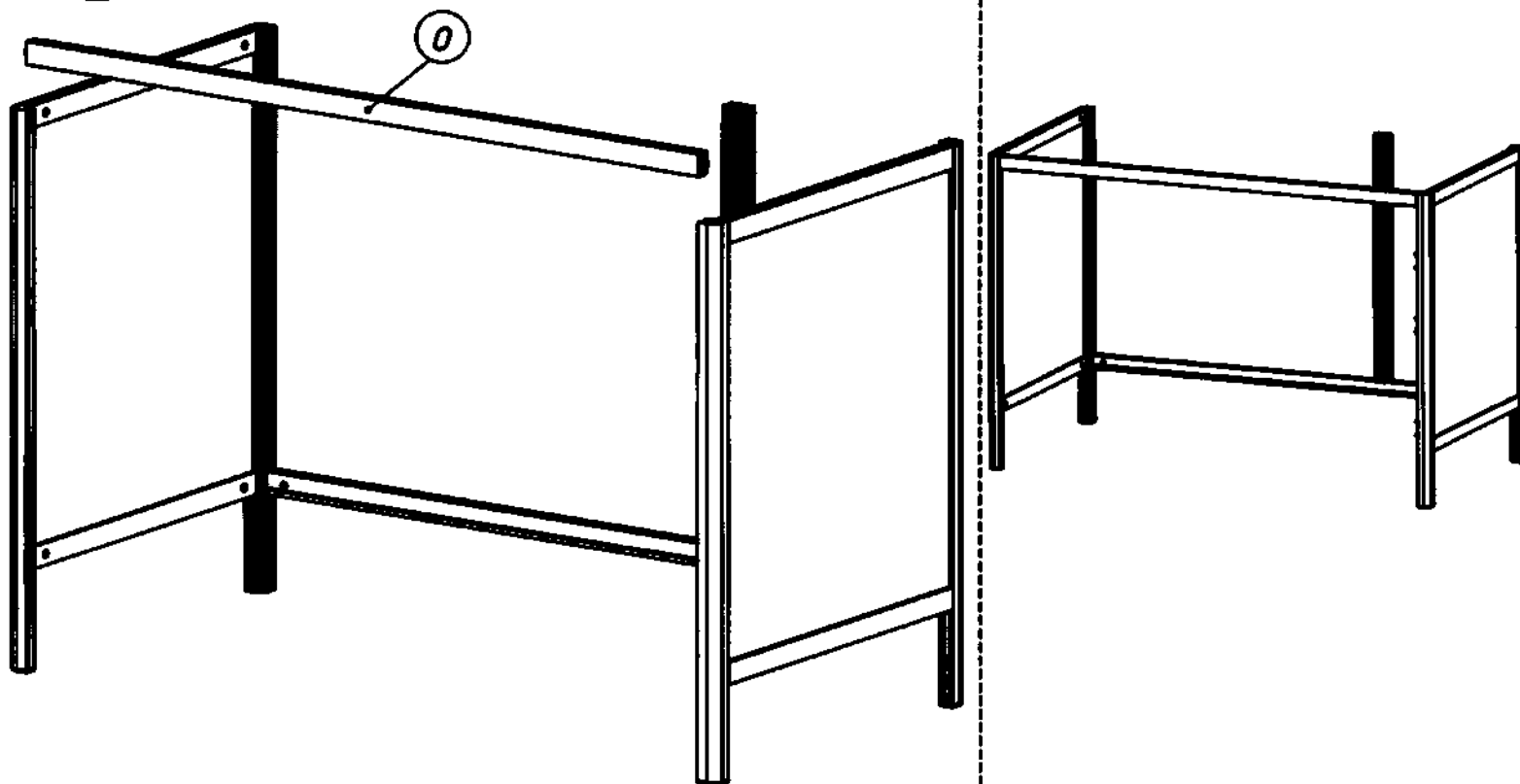

9 этап

Ослабьте замки в стойке передней (Е) с помощью ключа 16. Вставьте стойку по центру прогона ①. После этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков стойки находились с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винты замков стойки, но не до полной фиксации стойки на прогонах, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки.

Ex1 шт.

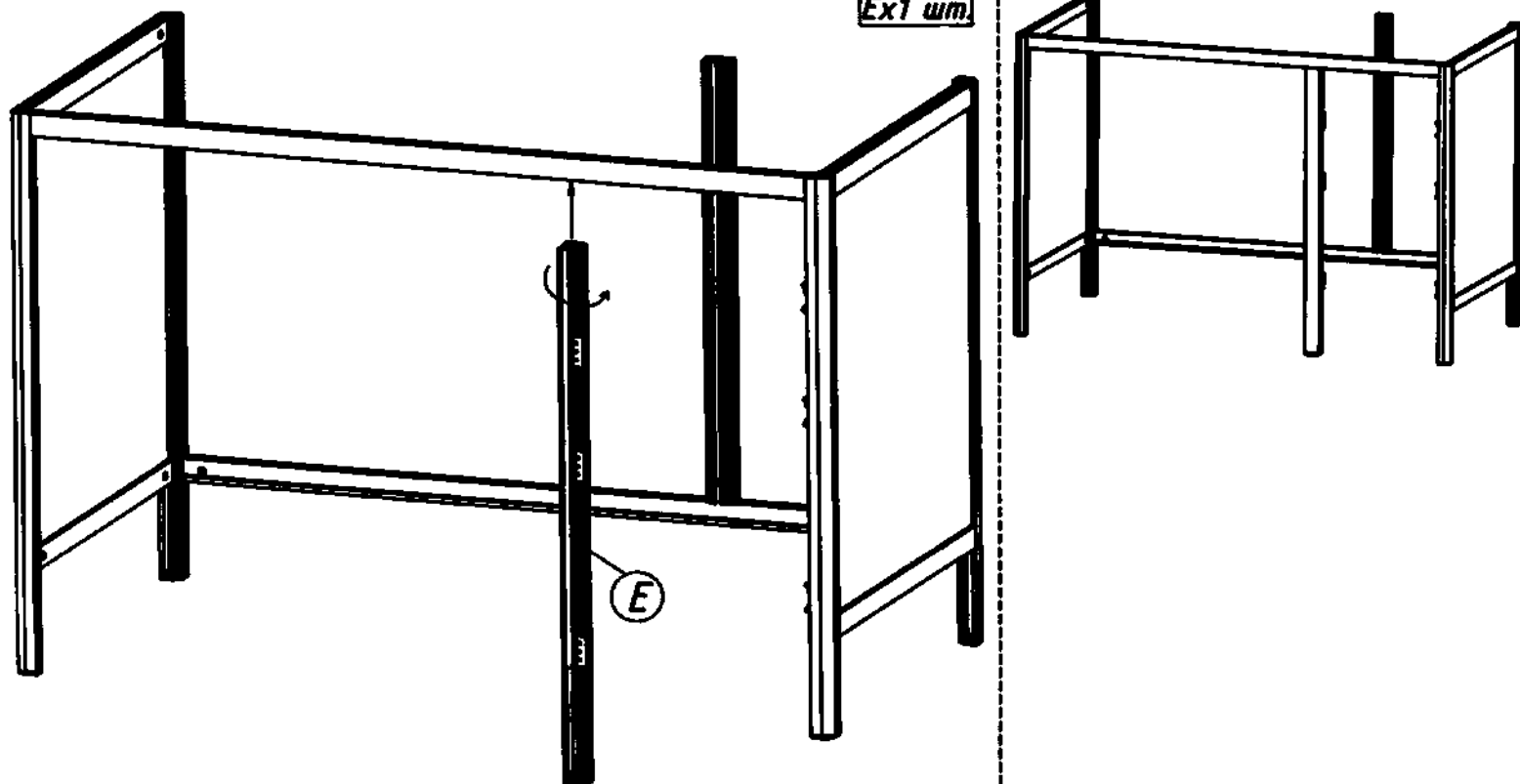

Произведите установку роликовых направляющих


10 этап

Гх1 шт.

6х3 шт.

8х6 шт.

9/2х3 шт.


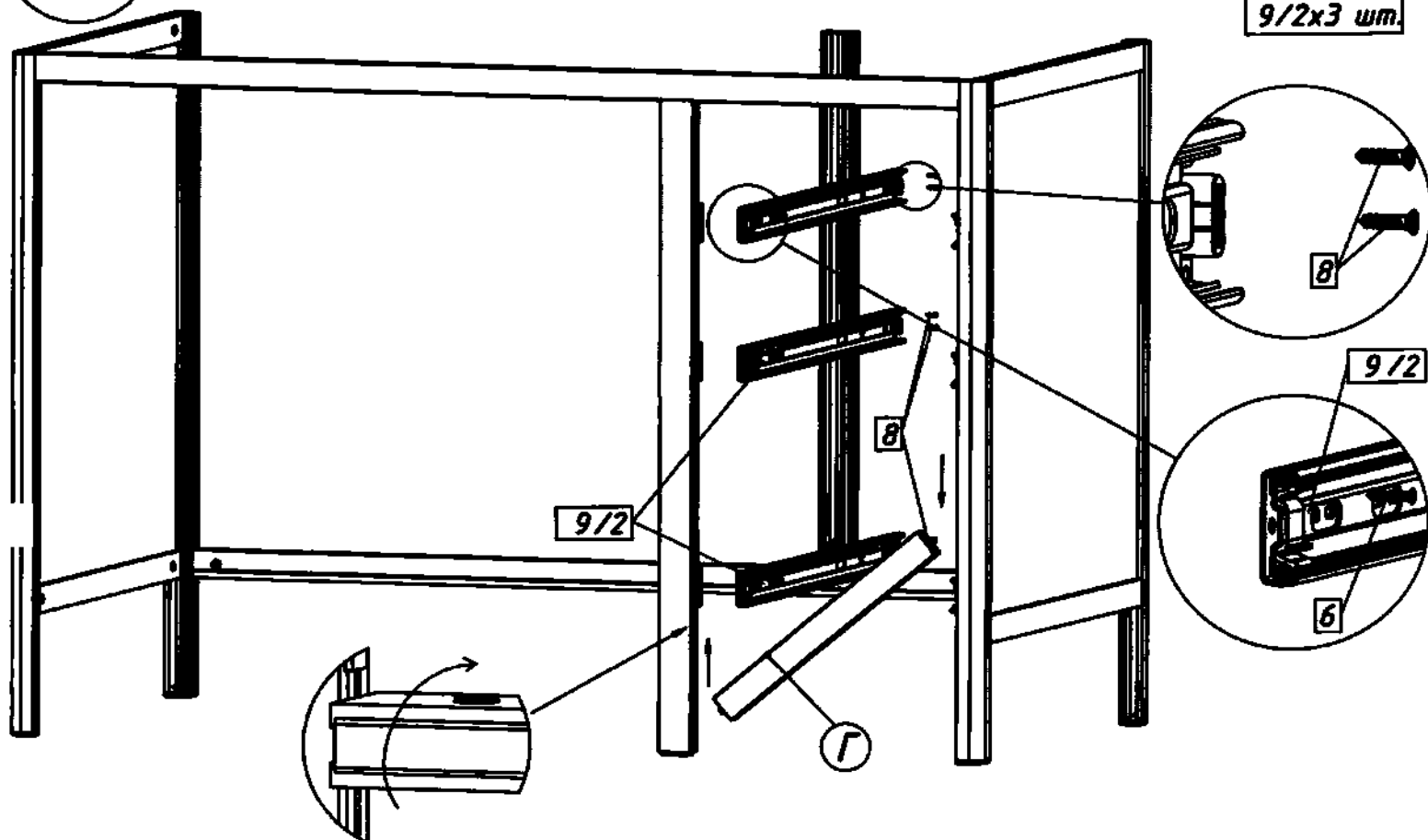


11 этап

Произведите установку стенки задней левой (З) и прогона заднего левого (К). Далее затяните винты замков прогона.

3х1 шт.

Кх1 шт.

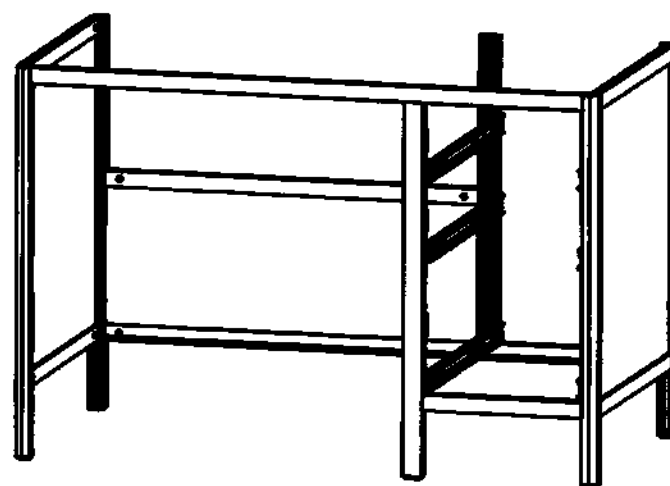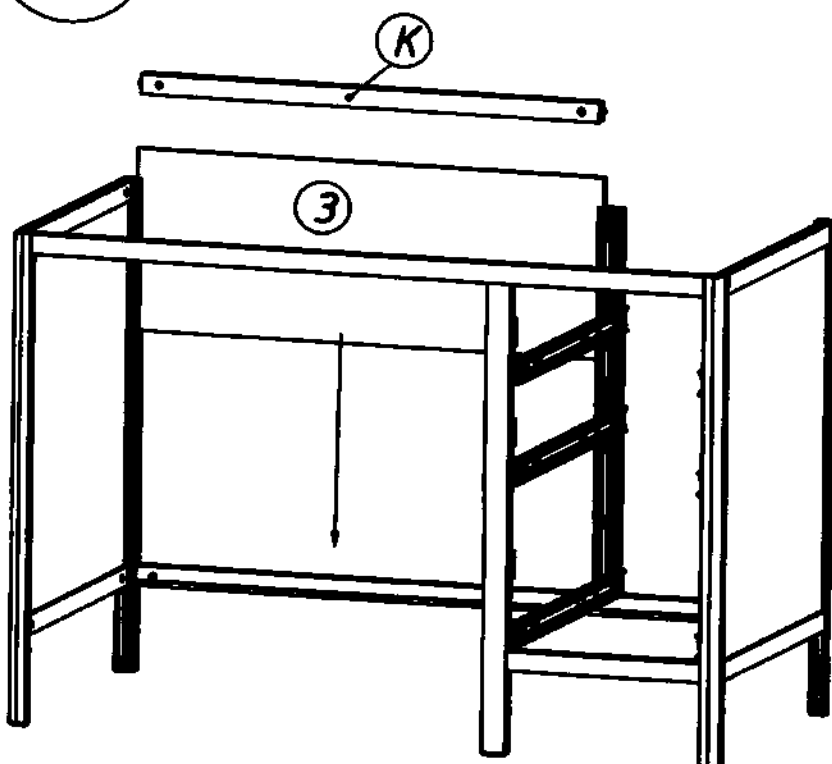



ВНИМАНИЕ: после данного этапа сборки необходимо затянуть винты замков стойки задней (Ж) и стойки передней (Е), тем самым окончательно зафиксировав их.

ОМ.29.771.03

Произведите установку стенки задней левой ③ и стенки задней правой ④

3x1 шт.
Их1 шт.




12 этап

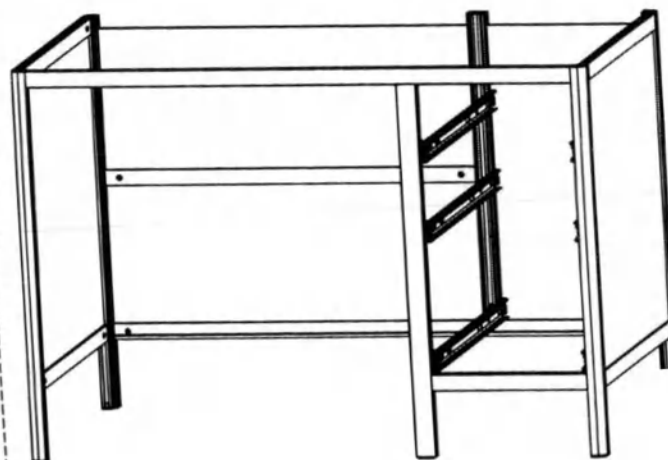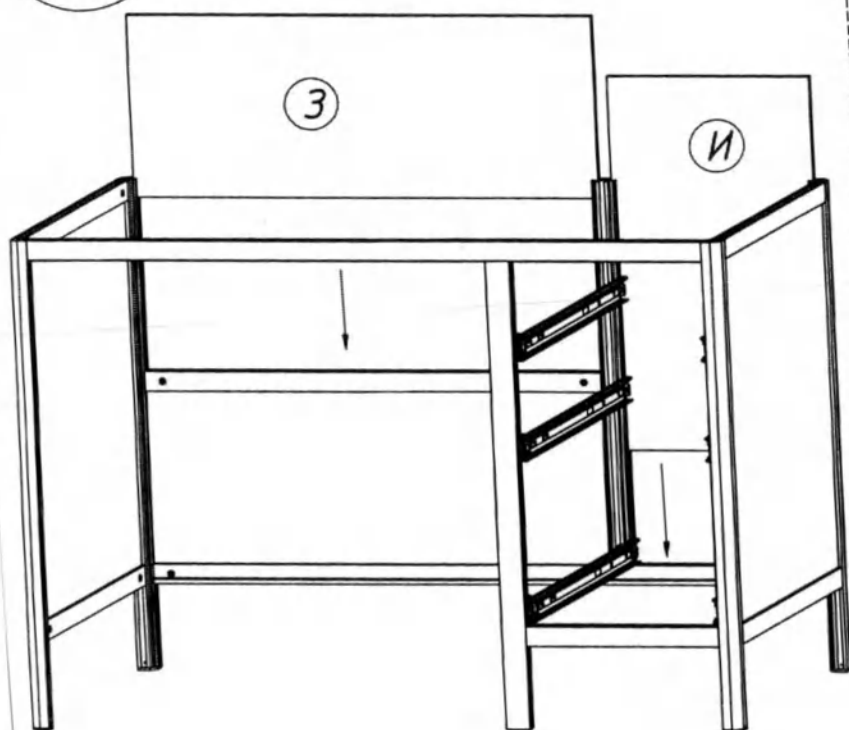

13 этап

Произведите установку прогона верхнего заднего левого ① и прогона верхнего заднего правого ② таким образом, чтобы винты замков прогонов ① и ② находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Лх1 шт.
Мх1 шт.

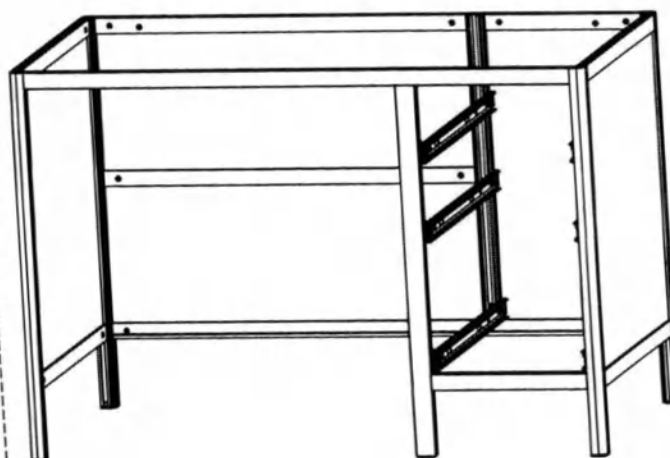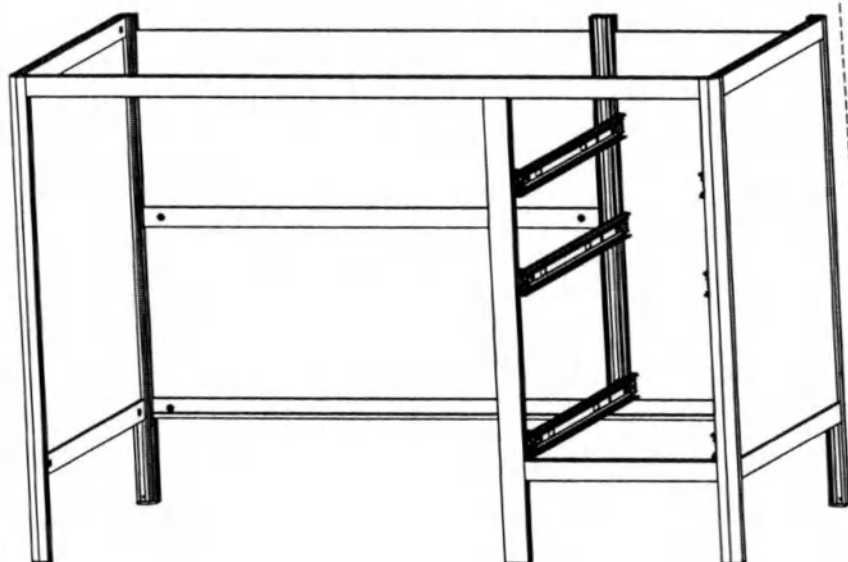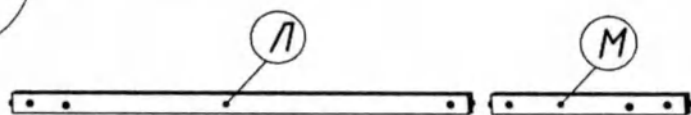



Стел для размещения и хранения медицинских изделий (мод.7)

ОМ.29.771.03

Произведите установку перегородки (Н) в пазы стойки задней (Ж) и стойки передней (Е)

14 этап

Нх1 шт.

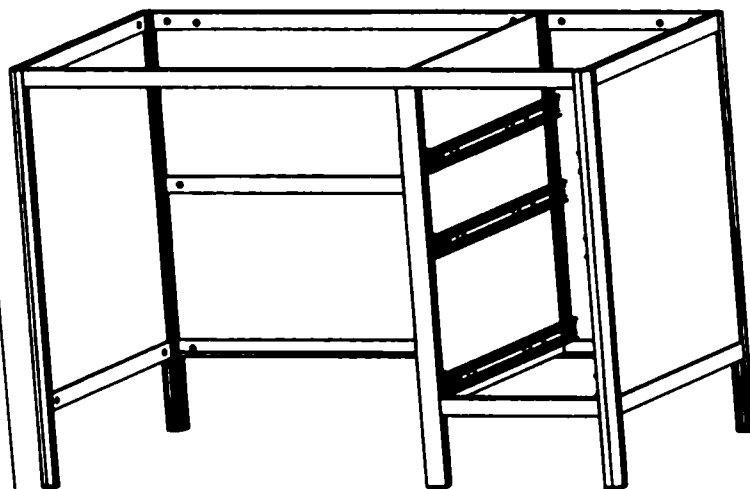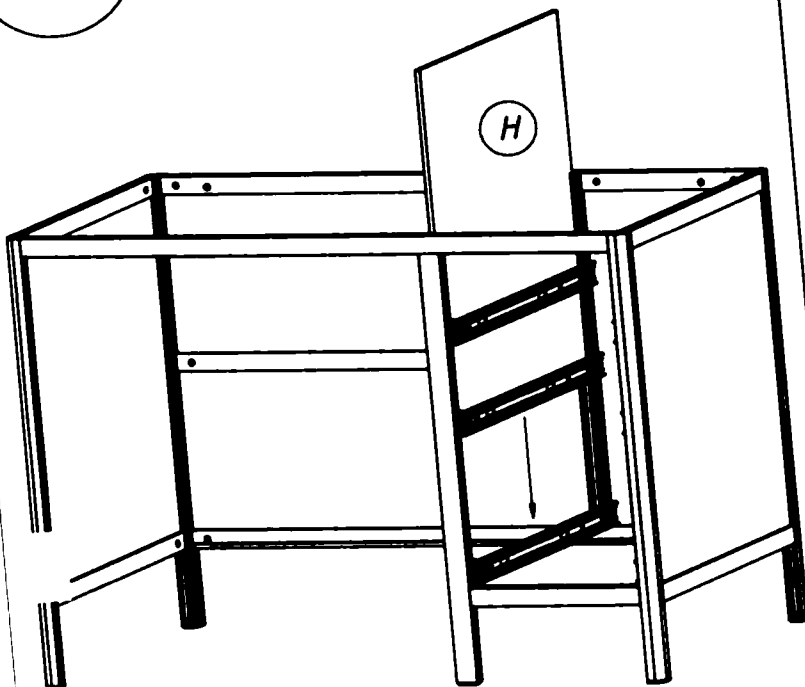


Произведите сборку столешницы

15 этап

Ах1 шт.

2х4 шт.

1х4 шт.


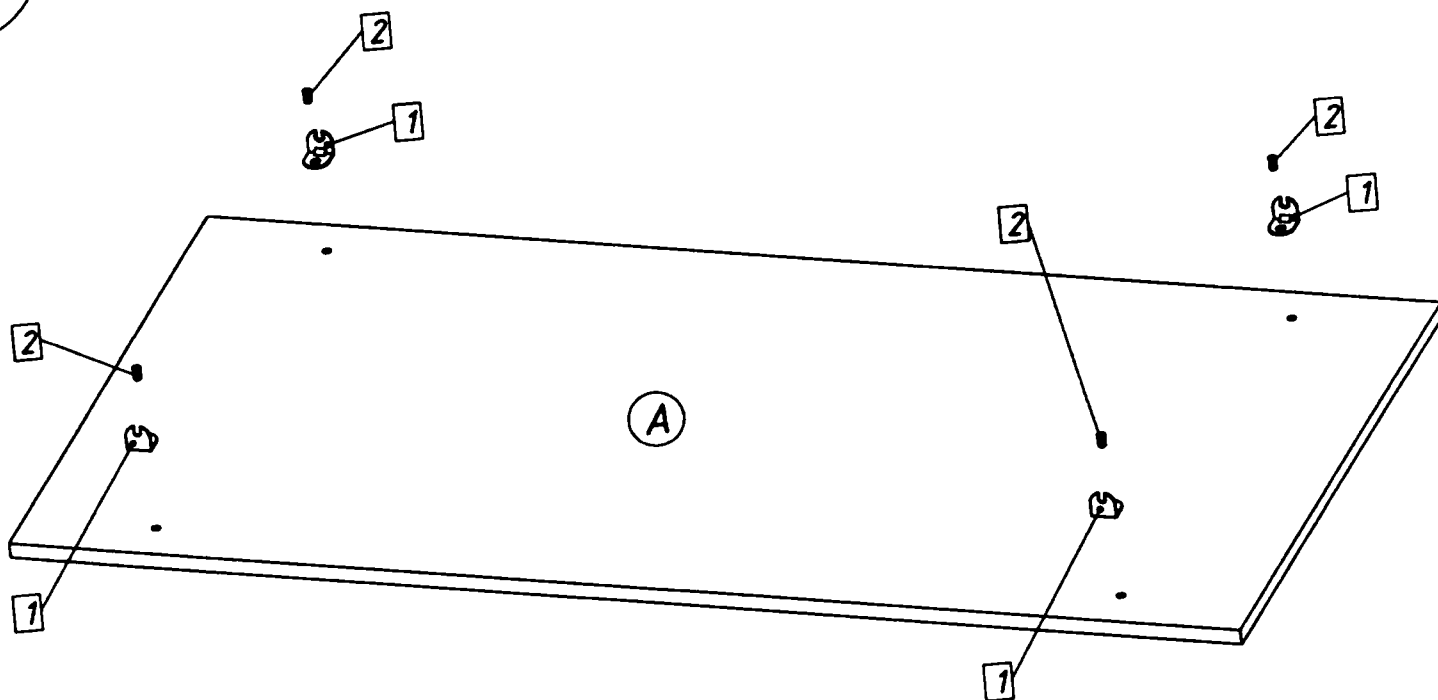


Стел для размещения и хранения медицинских изделий (мод.7)

Произведите установку ранее собранного каркаса тумбочки на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

Ах1 шт.

16 этап

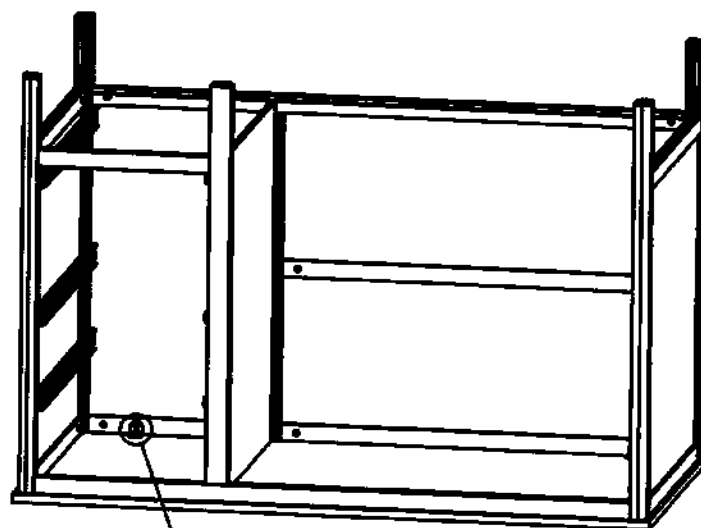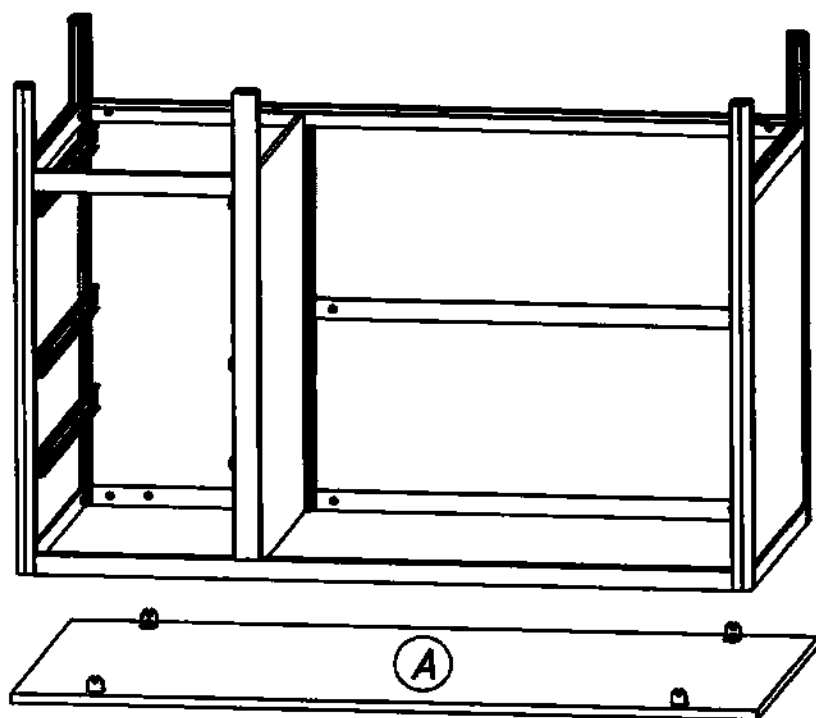

Затяните четыре винта в уголках для фиксации столешницы.

Произведите установку опор, вкручивая их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.


4x5 шт.
12x9 шт.

17 этап

Опоры 4 следует закручивать рожковым ключом по часовой стрелке, либо плоскогубцами.

ВНИМАНИЕ:


Рожковый ключ, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

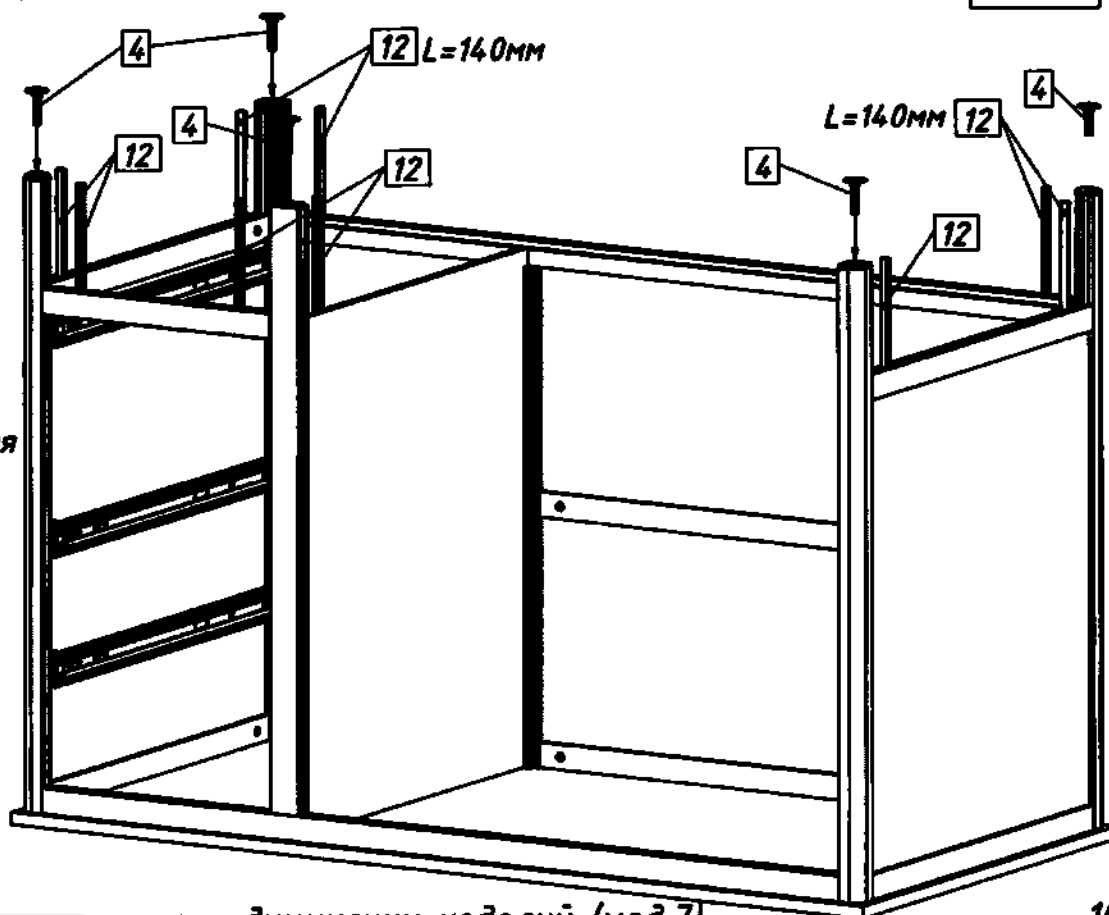

После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.

Произведите сборку деталей для каркасов выдвижных ящиков
Соберите каждые стенки П, Р, С в 2-х экземплярах.


18 этап

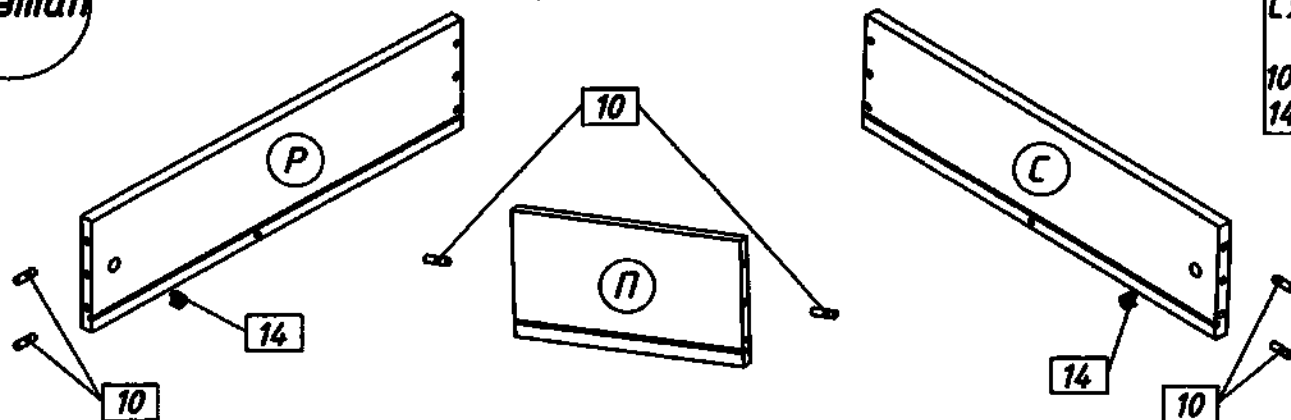

Пх1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
10х6 шт.
14х2 шт.

x2


19 этап

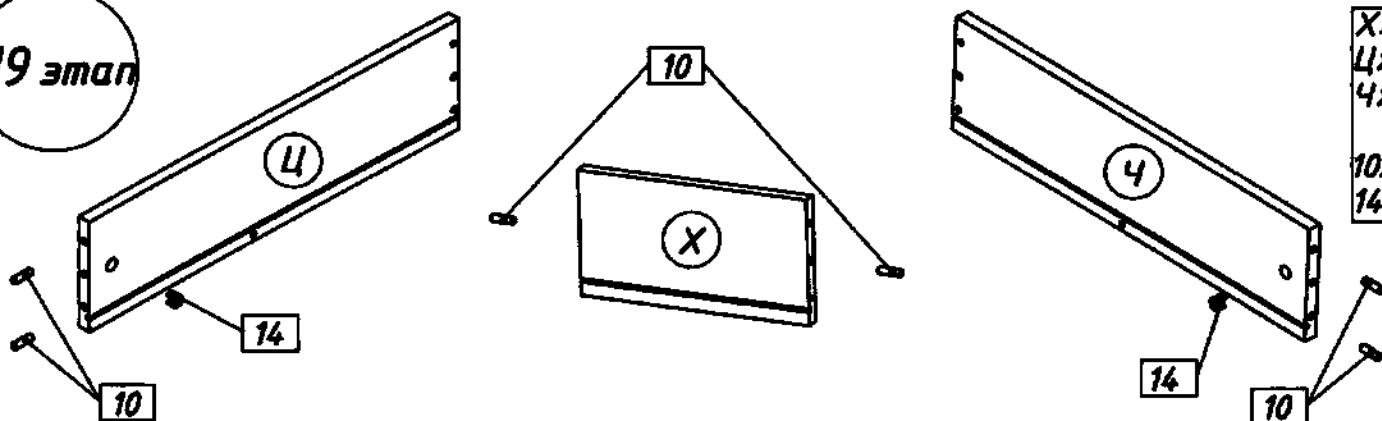

Хх1 шт.
Цх1 шт.
Чх1 шт.
10х6 шт.
14х2 шт.


Произведите сборку 3-х каркасов выдвижных ящиков

20 этап

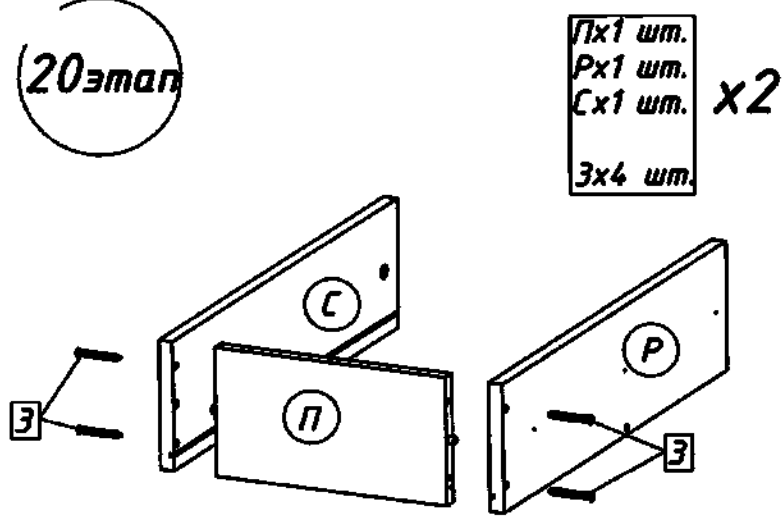



Пх1 шт.
Рх1 шт.
Сх1 шт.
3х4 шт.

x2

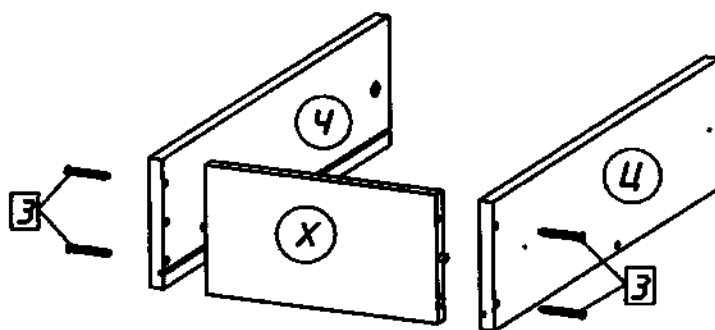


Хх1 шт.
Цх1 шт.
Чх1 шт.
3х4 шт.

21 этап

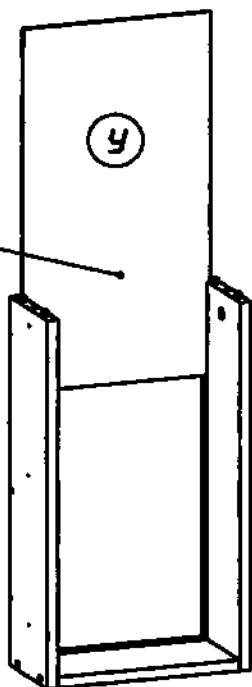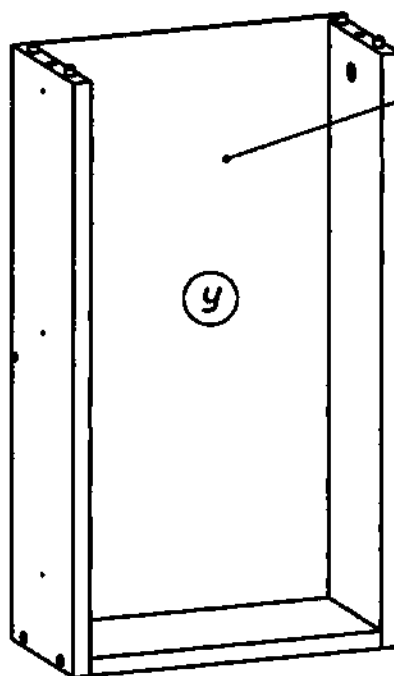Окрашенная
сторонаОкрашенная
сторонаПроизведите установку планок для 3-х
каркасов выдвижных ящиковТх1 шт. X3
Зх2 шт.

22 этап



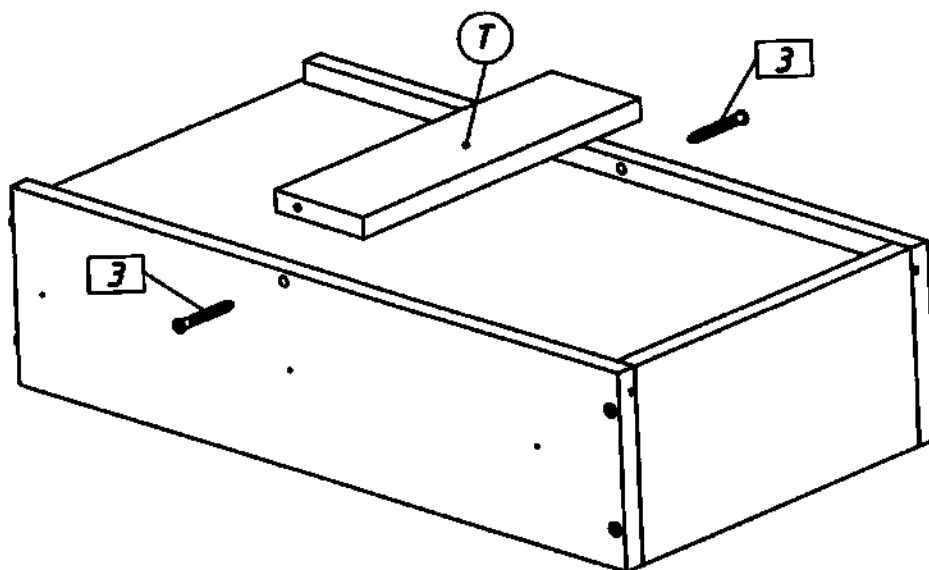


23 этап

Фх1 шт.

11/1х1 шт.
11/2х2 шт.
13х2 шт.

x2

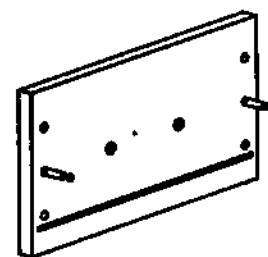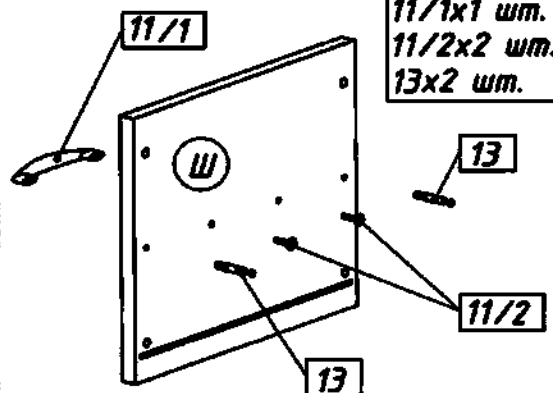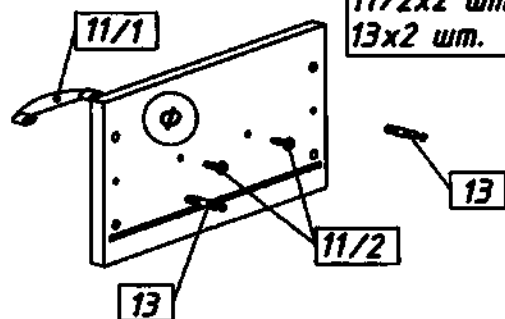

11х1 шт.


11/1х1 шт.
11/2х2 шт.
13х2 шт.Произведите установку 3-х фасадов выдвижных ящиков
Схема фиксации фасада (Ф) и установки заглушек**24 этап**

15

Фх1 шт.

15х2 шт.

x2

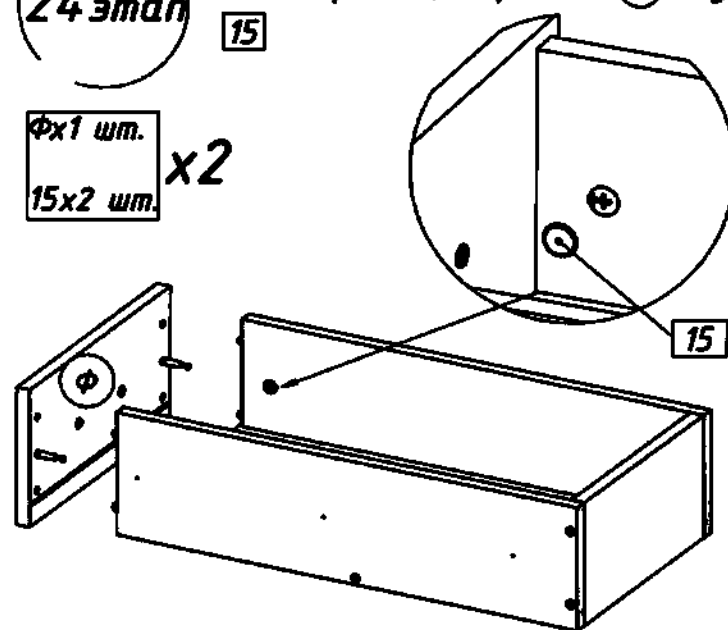

Соединив фасады (Ф) и (Ш) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики 14 для его фиксации. Затем установите заглушки 15.


11х1 шт.

15х2 шт.

Произведите установку направляющих на 3 выдвижных ящика

25 этап8х6 шт.
9/1х2 шт.




x3

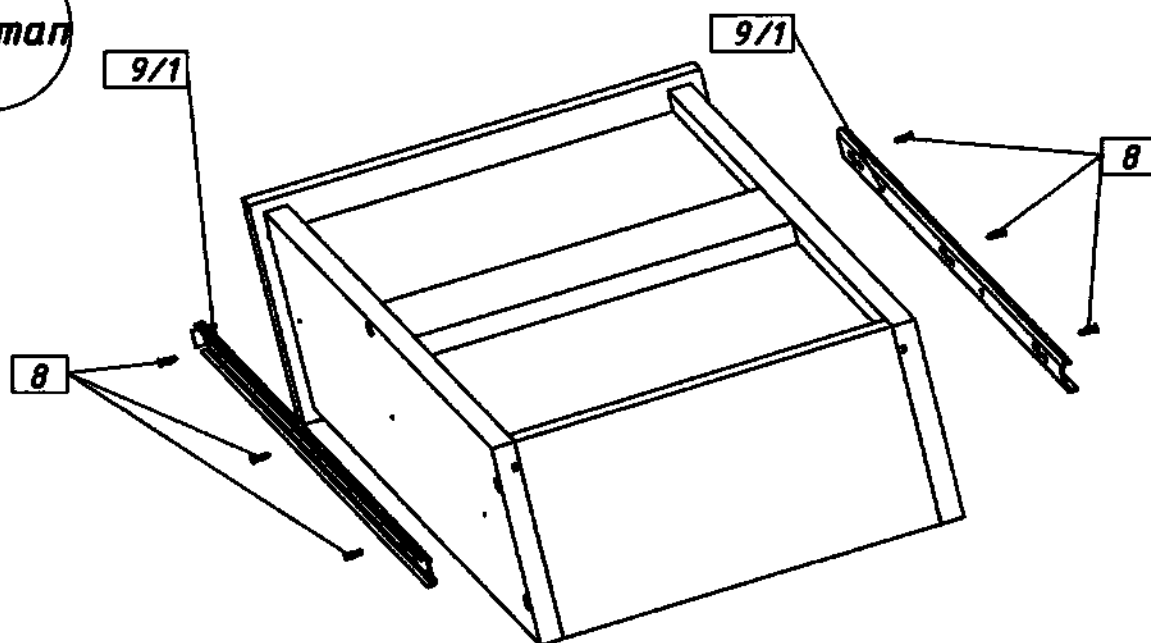


5x1 шт.

ОМ.29.771.03 Произведите установку ящиков.
Наклейте самоклеящийся логотип
компании


26 этап

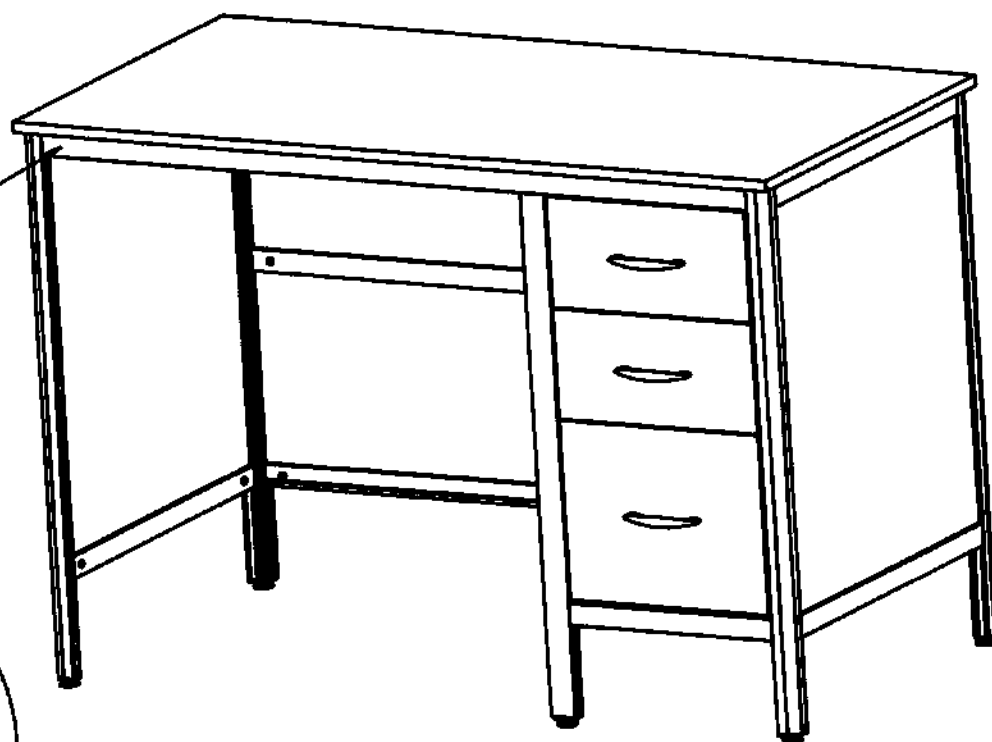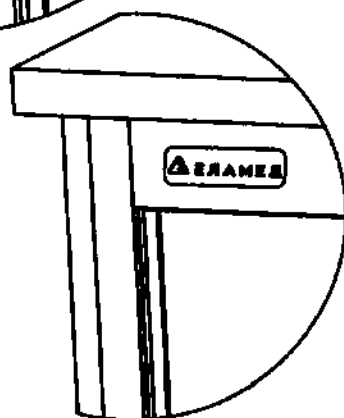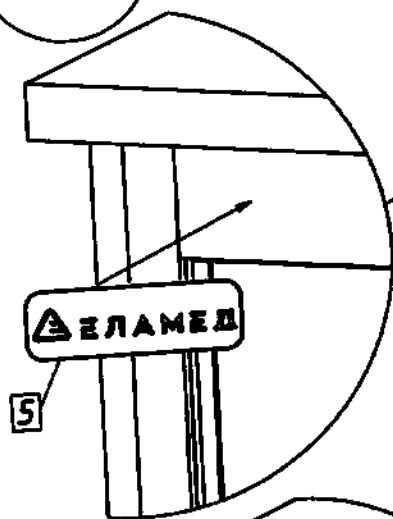

Сборка изделия завершена

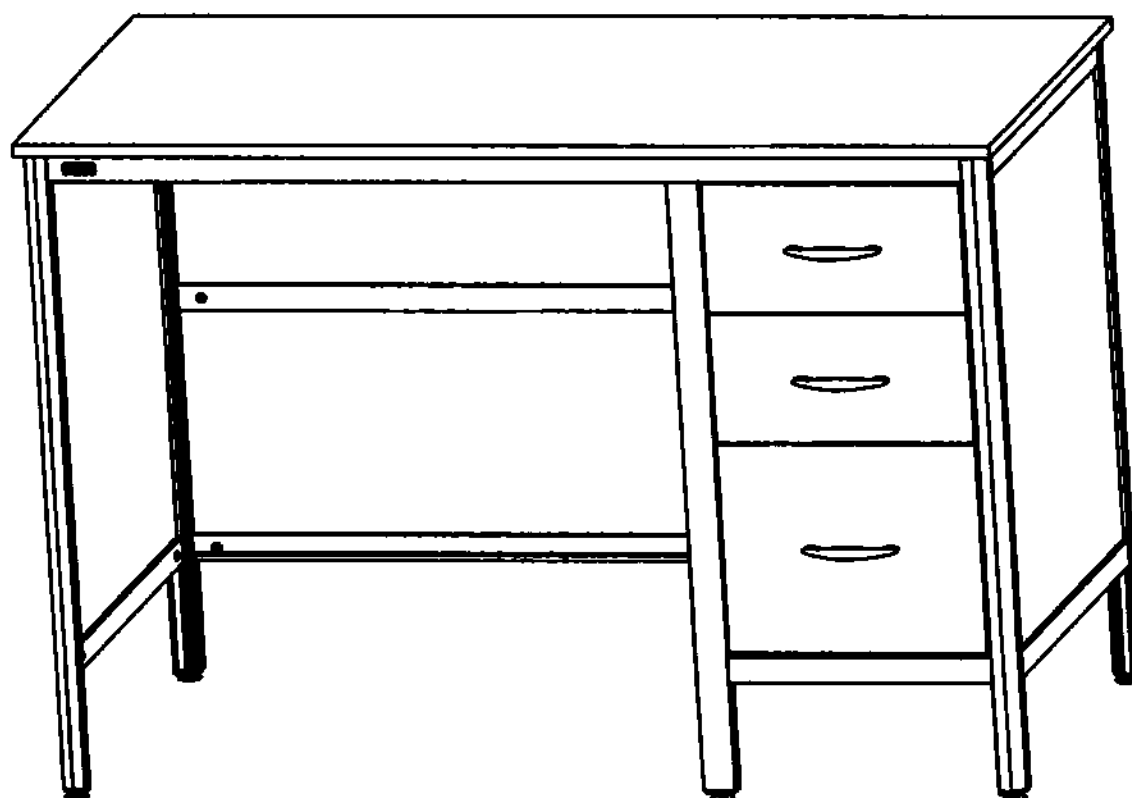

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942818.114 ТУ
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.8)

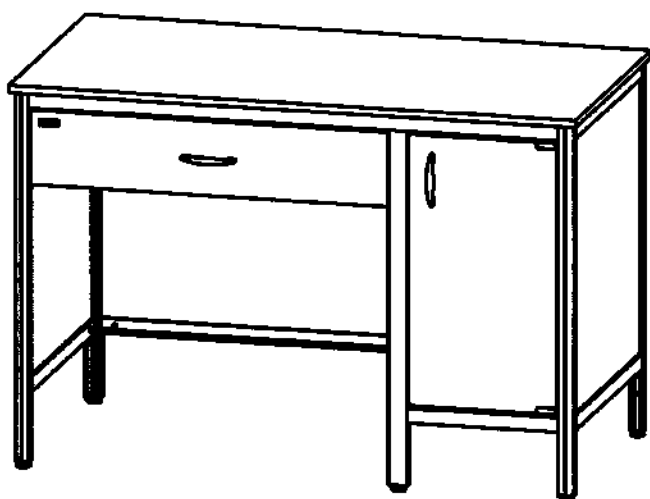

Условные обозначения:



- 1-Щ : детали
 2. [1] - [20] : крепёж и фурнитура
 3. (1) - (30) : этапы сборки

Код товара: _____

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон нижний передний	1
Д	Прогон нижний задний	1
Е	Стойка передняя	1
Ж	Стойка задняя	1
З	Стенка задняя левая	2
И	Стенка задняя правая	1
К	Прогон задний левый	1
Л	Прогон верхний задний левый	1
М	Перегородка	1
Н	Прогон верхний передний	1
О	Стенка задняя выдвижного ящика	1
П	Стенка левая выдвижного ящика	1
Р	Стенка правая выдвижного ящика	1
С	Планка выдвижного ящика	1
Т	Дно выдвижного ящика	1
У	Фасад выдвижного ящика	1
Ф	Дверь	1
Х	Заглушка прогона нижнего	1
Ц	Заглушка прогона верхнего	1
Ч	Полка верхняя	1
Ш	Полка нижняя	1
Щ	Прогон задний правый	1
Э	Прогон перегородки	1
Ю	Перегородка нижняя	1

Крепёж и фурнитура

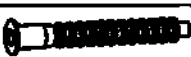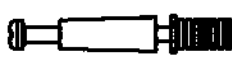Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4	Евровинт 6,3х13	
3	6	Конфирмат	
4	5	Опора	
5	8	Полкодержатель	
6	4	Саморез 3х20	
7	2	Площадка под направляющие	
8	14	Саморез 3х12	
9	1 комплект	Направляющие	 
10	6	Шкант мебельный	
11	2 комплекта	Ручка мебельная	 
12	-	Заглушка декоративная	
13	2	Шток эксцентрика	
14	2	Эксцентрик	
15	2	Заглушка эксцентрика	
16	1	Защёлка магнитная	 
17	1	Площадка магнита	
18	1 комплект	Петля для дверей из ЛДСП	
19	1	Логотип компании	
20*	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы **3** закручивать ключом шестигранником **20** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

6x1 шт.



6x1 шт.

7x1 шт.

8x2 шт.

9/2x1 шт.

12x1 шт.

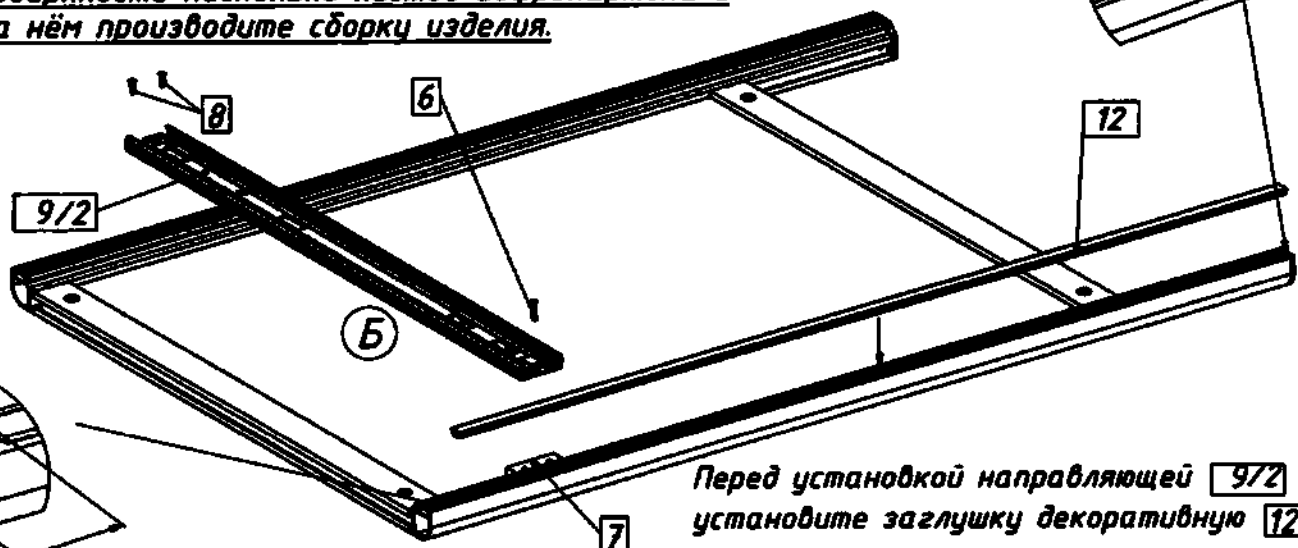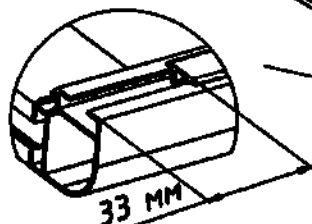

Перед установкой направляющей 9/2 установите заглушку декоративную 12



Площадку под направляющие 7 вставьте в паз стойки. Среднее отверстие в площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.

2 этап

Произведите сборку стенки правой

Места установки полкодержателей 5 обозначены рисками. Установив полкодержатели 5, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 20

33 мм

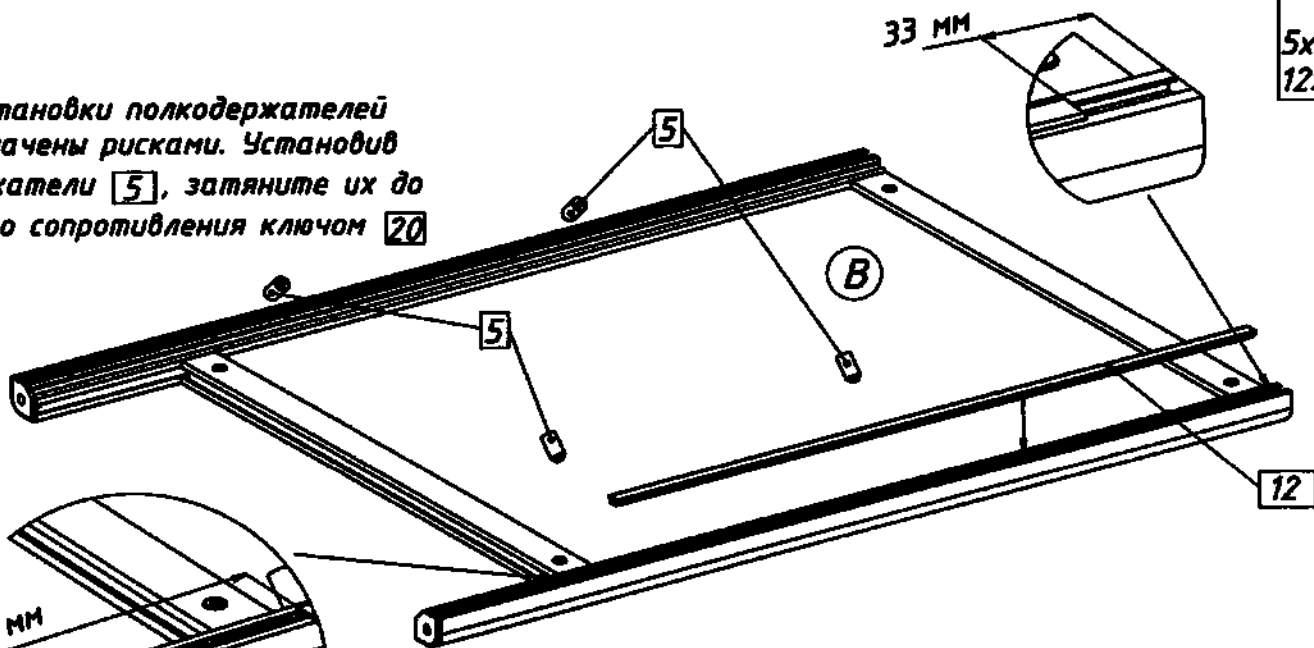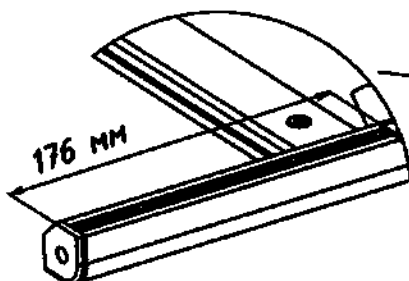


8x1 шт.

5x4 шт.

12x1 шт.

3 этап

Произведите сборку стойки задней (Ж)

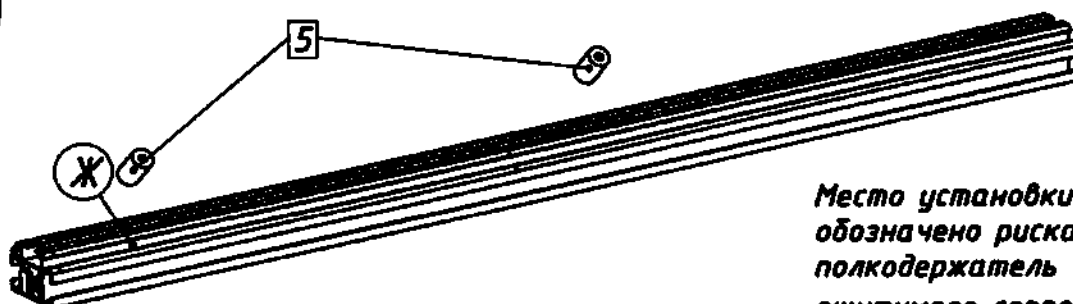

Жx1 шт.



5x2 шт.

Место установки полкодержателя 5 обозначено рисками. Установив полкодержатель 5, затяните его до ощутимого сопротивления ключом 20

4 этап

Ех1 шт.
Хх1 шт.
5х2 шт.
7х1 шт.
12х2 шт.

Схема установки заглушек 12 в стойку

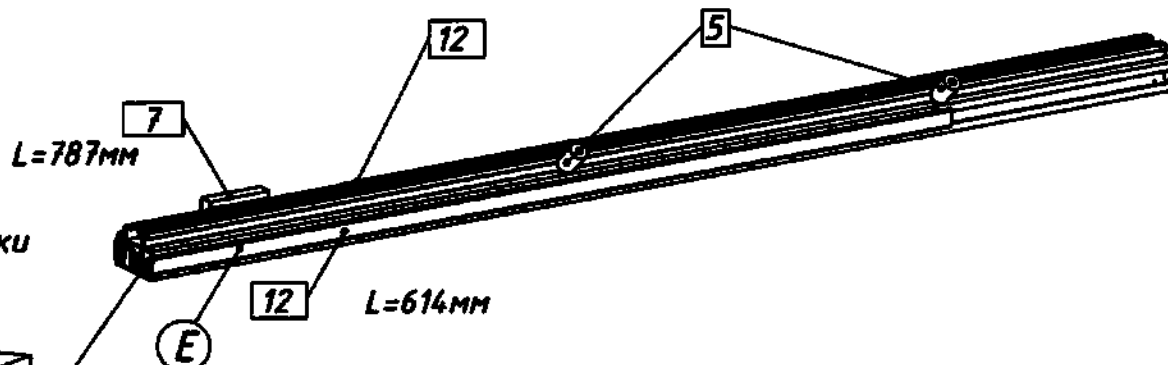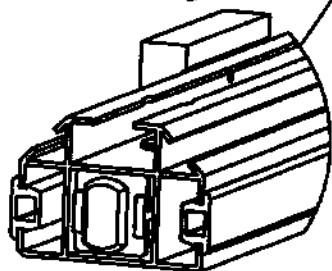

Места установки полкодержателей 5 обозначены рисками. Установив полкодержатели 5, затяните их до ощутимого сопротивления ключом 20



Площадку под направляющие 7 вставьте в паз стойки. Среднее отверстие в площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.

5 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего (Г)

Схема установки заглушки (Х)

Гх1 шт.
Хх1 шт.

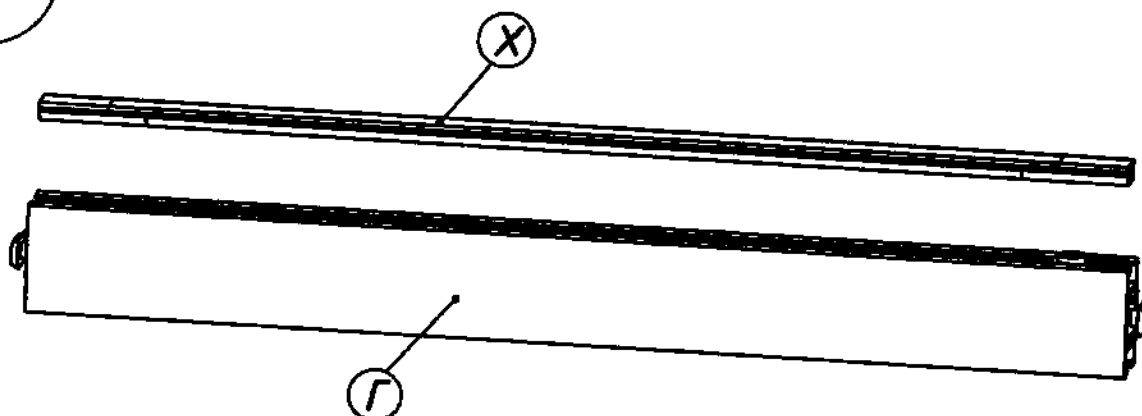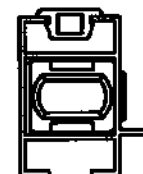


6 этап

Произведите сборку прогона переднего верхнего (Н)

Нх1 шт.
Цх1 шт.
6х2 шт.
8х2 шт.
12х1 шт.
16/1х1 шт.
17х1 шт.


Схема установки заглушек 12 и Ц

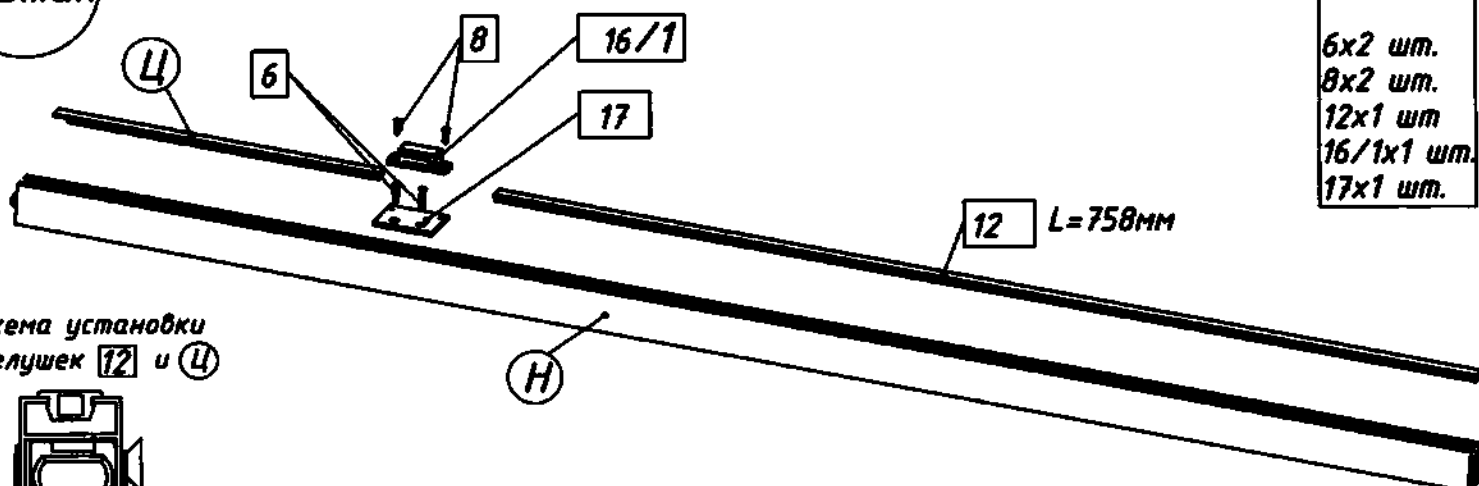


7 этап

Ослабьте замки в прогоне нижнем заднем (Д) с помощью ключа [20]. Вставьте прогоны в стенки (Б) и (В). После этого поверните прогоны на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков прогонов находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Бх1 шт.
Вх1 шт.
Дх1 шт.

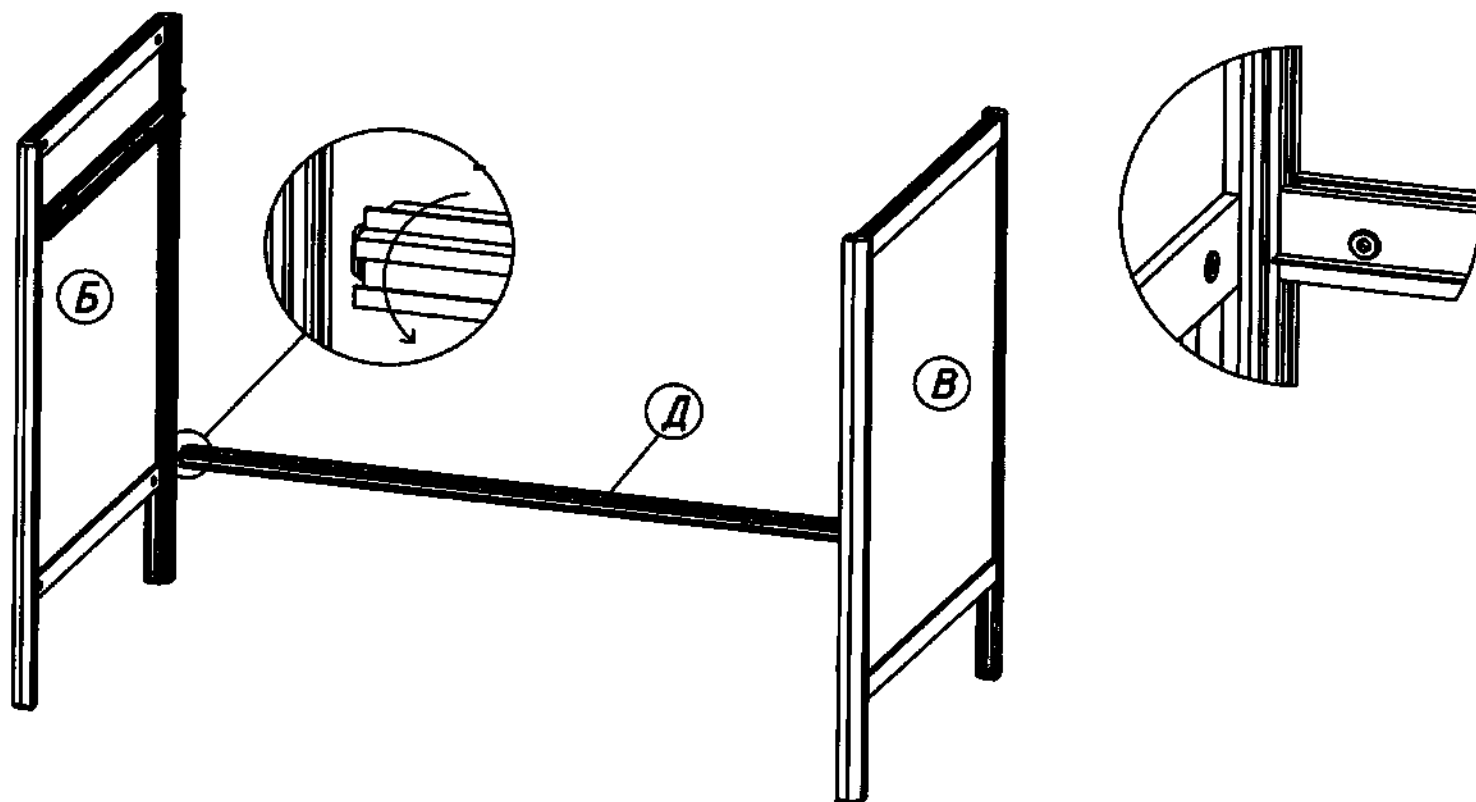**8 этап**



Ослабьте замок в стойке задней (Ж) с помощью ключа [20]. Вставьте стойку по центру прогона (Д) и после этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винт замка стойки находился с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винт замка стойки, но не до полной фиксации, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки (Ж) при установке стенок задних.

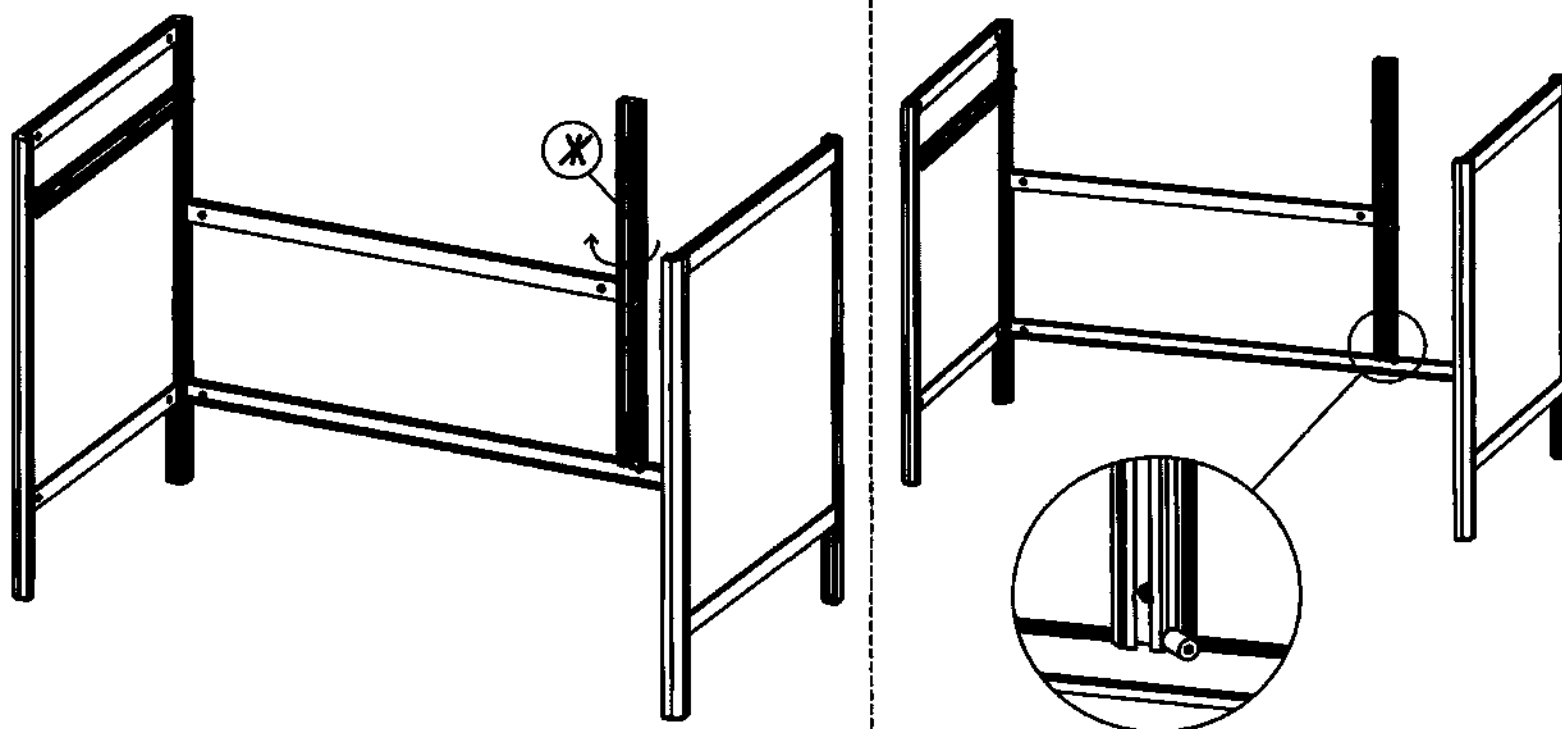

Произведите установку прогона верхнего переднего (Н) таким образом, чтобы винты замков прогона (Н) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона (Н), тем самым зафиксировав его на стенках.

Нх1 шт.



9 этап

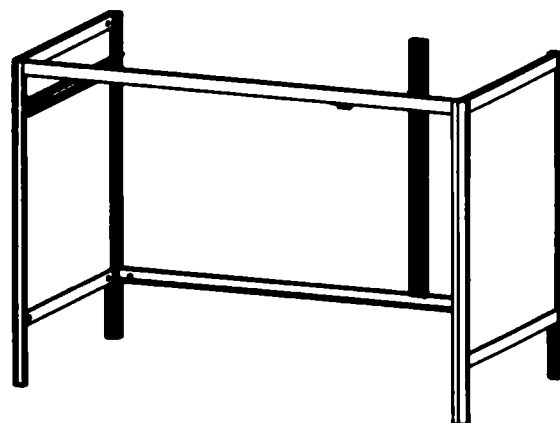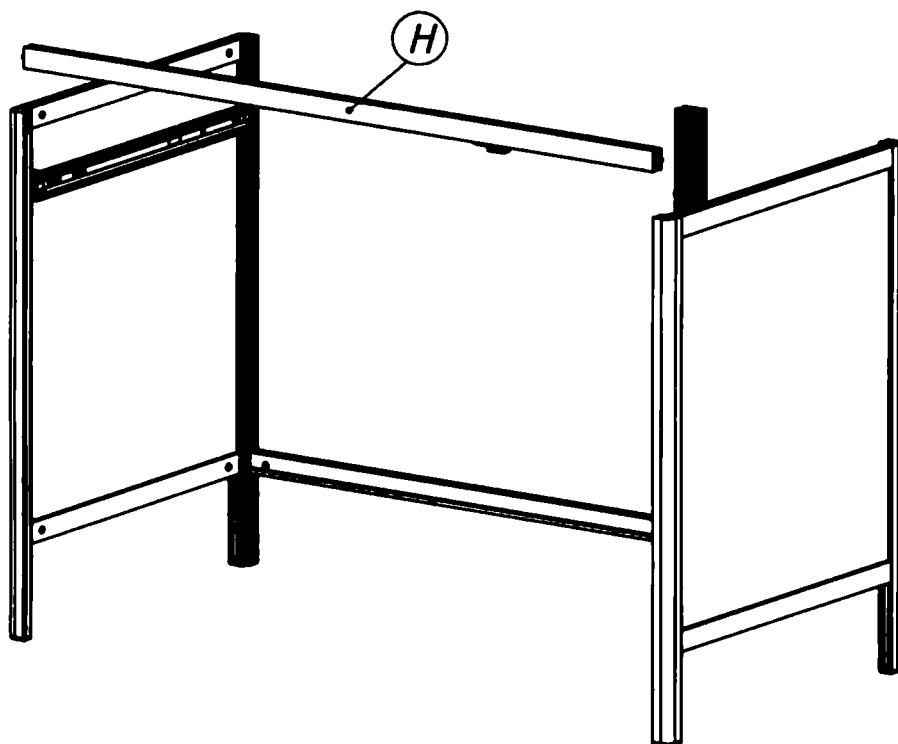

10 этап


Ослабьте замки в стойке передней (Е) с помощью ключа [21]. Вставьте стойку по центру прогона (Н). После этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков стойки находились с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винты замков стойки, но не до полной фиксации стойки на прогонах, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки.

Ех1 шт.

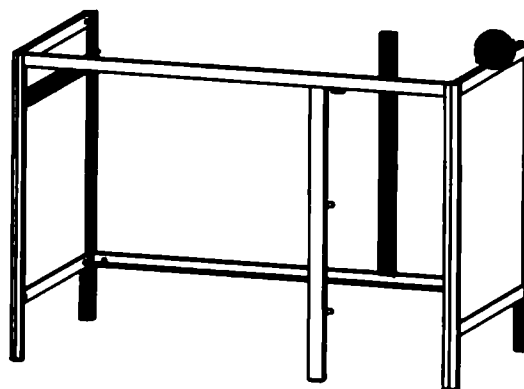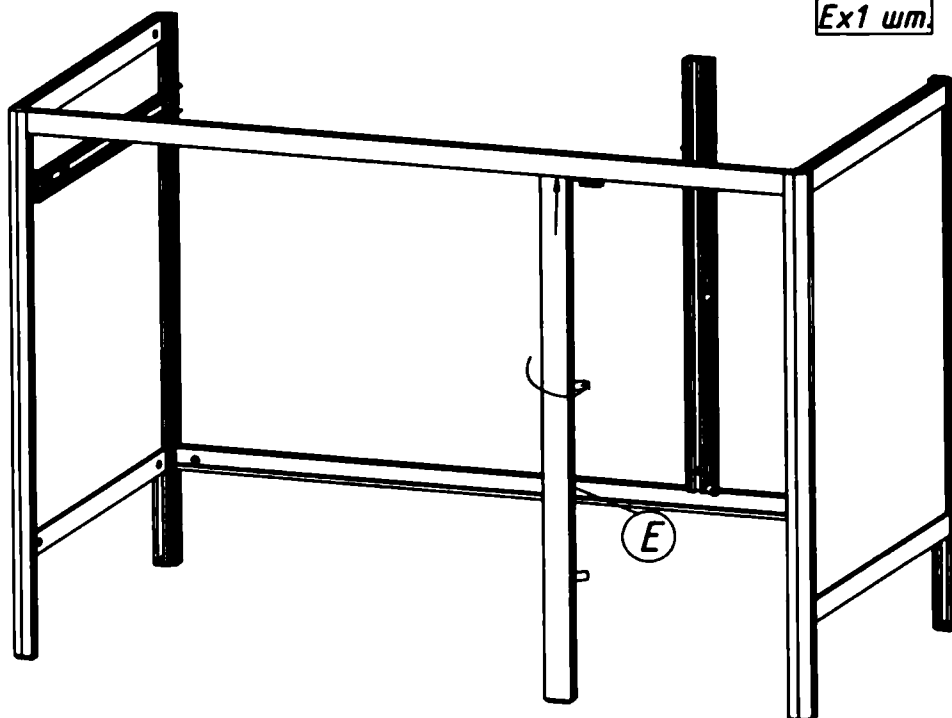

11 этап



Гх1 шт.
6х1 шт.
8х2 шт.
9/2х1 шт.

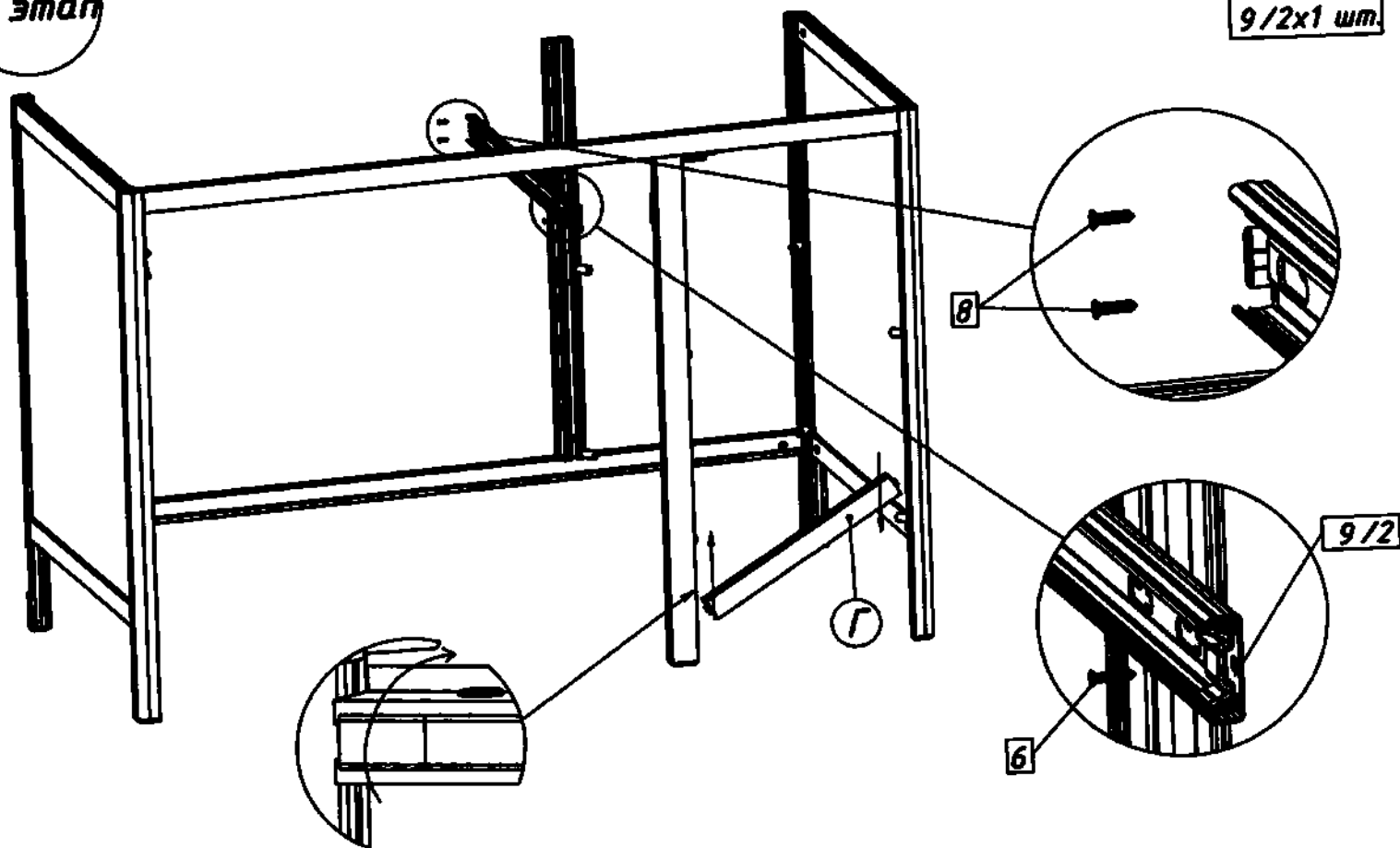

12 этап

Произведите установку стенки задней левой (З) и прогона заднего левого (К). Далее затяните винты замков прогона.

3х1 шт.
Кх1 шт.

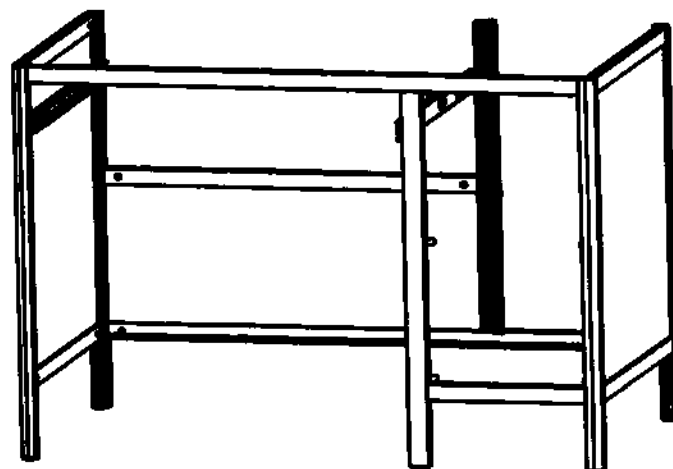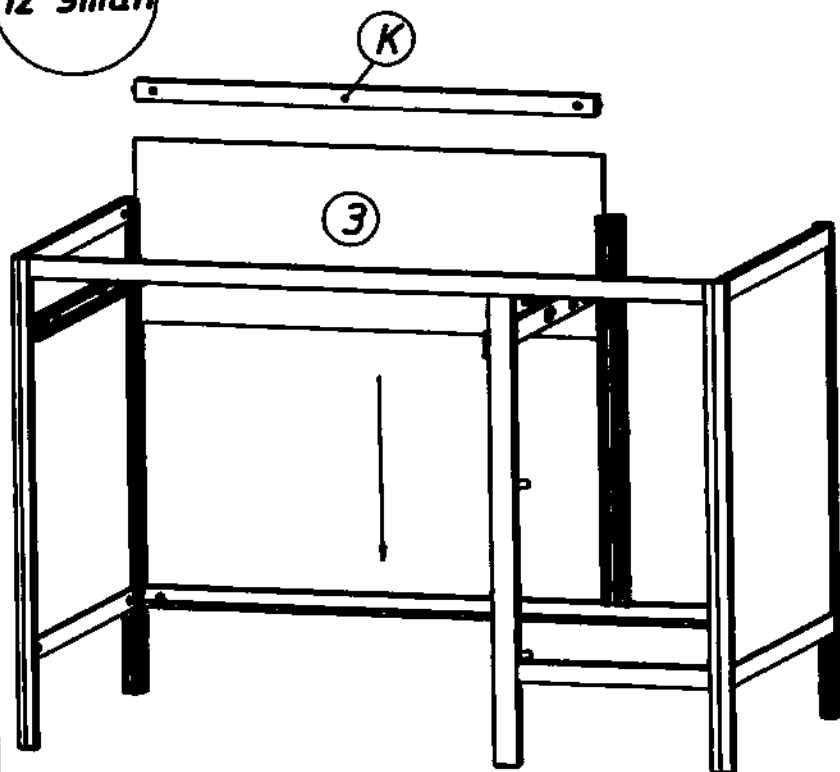



ВНИМАНИЕ: после данного этапа сборки необходимо затянуть винты замков стойки задней (Ж) и стойки передней (Е), тем самым окончательно зафиксировав их.

ОМ.29.774.03

Произведите установку стенки задней левой ③ и стенки задней правой ④

3x1 шт.
Их1 шт.



13 этап

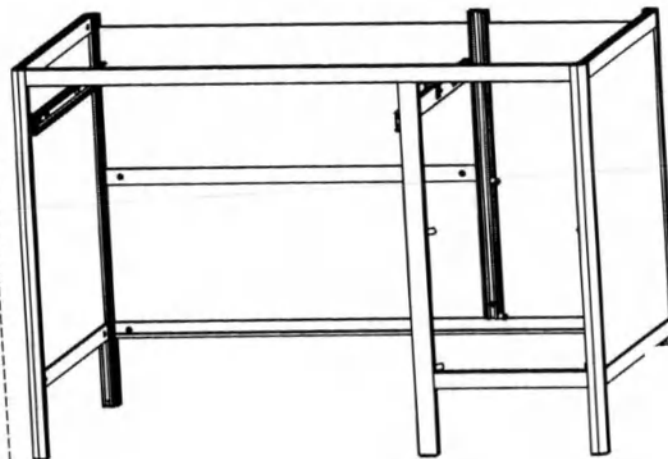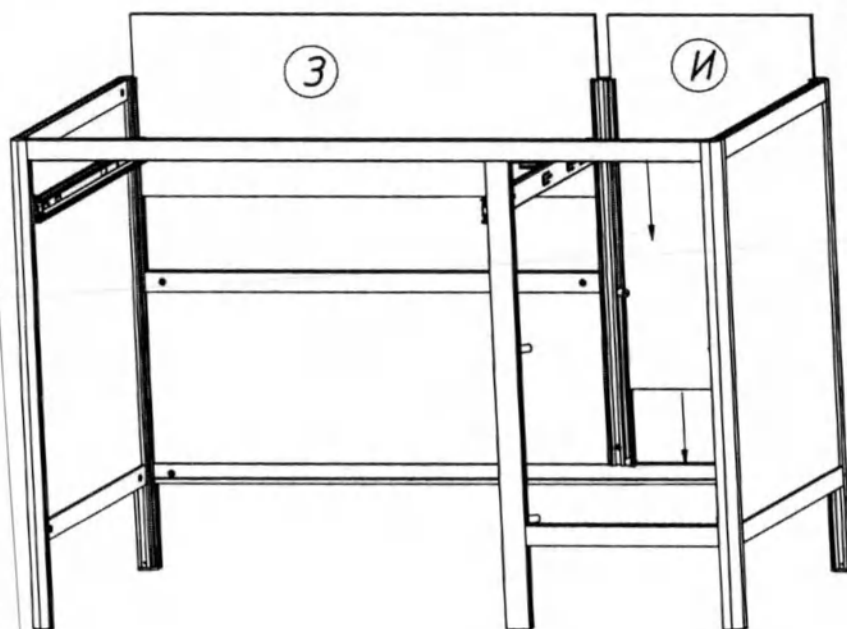

14 этап

Произведите установку прогона верхнего заднего левого ① и прогона верхнего заднего правого ② таким образом, чтобы винты замков прогонов ① и ② находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Лх1 шт.
Щх1 шт.

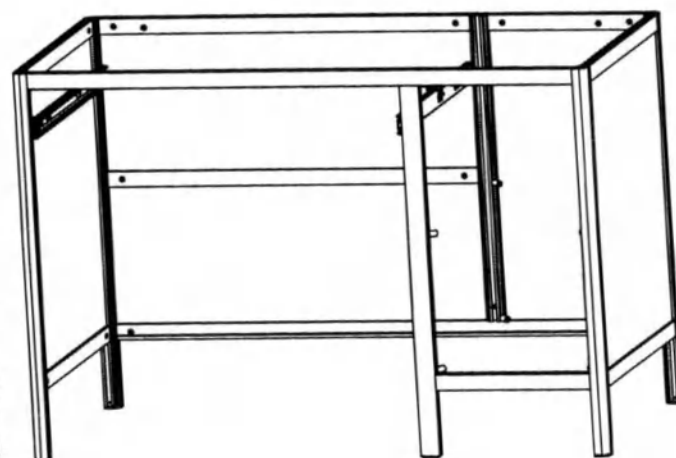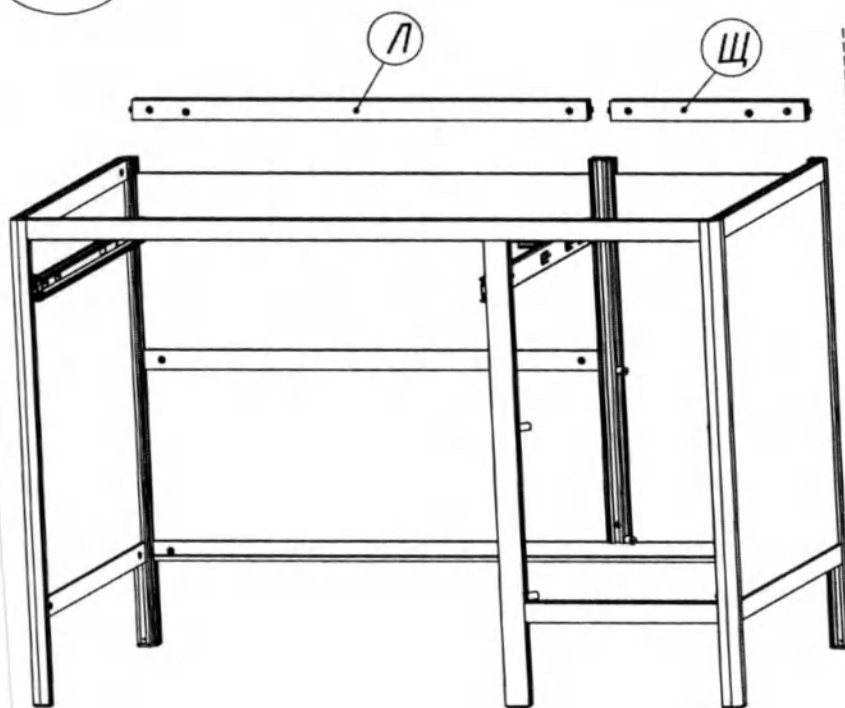



Стел для размещения и хранения медицинских изделий (мод.8)

ОМ.29.774.03

Произведите установку перегородки (М) в пазы стойки задней (Ж) и стойки передней (Е)

15 этап


Мх1 шт.
Эх1 шт.
Юх1 шт.

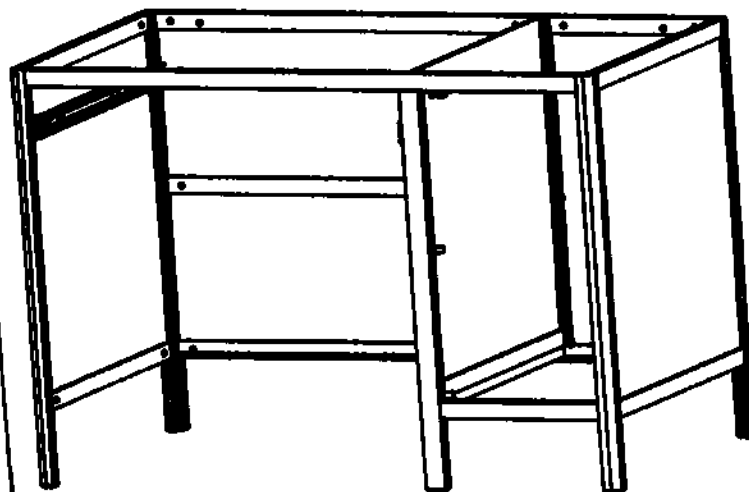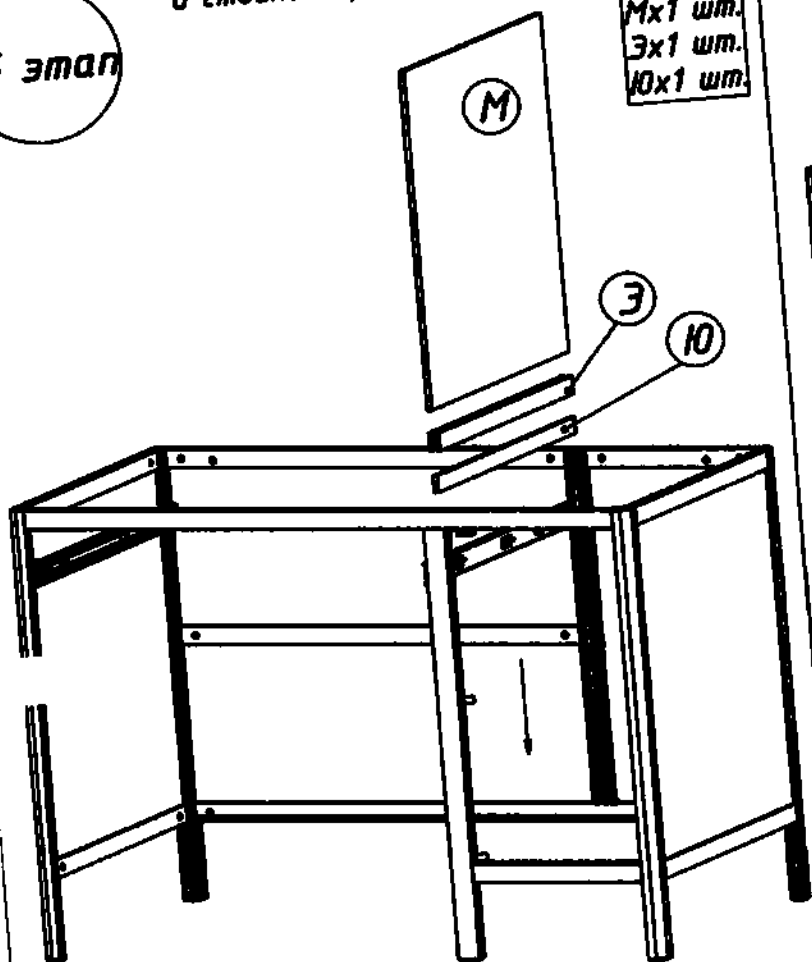

Ах1 шт.
2х4 шт.
1х4 шт.

16 этап

Произведите сборку столешницы
Для кода товара 1014395



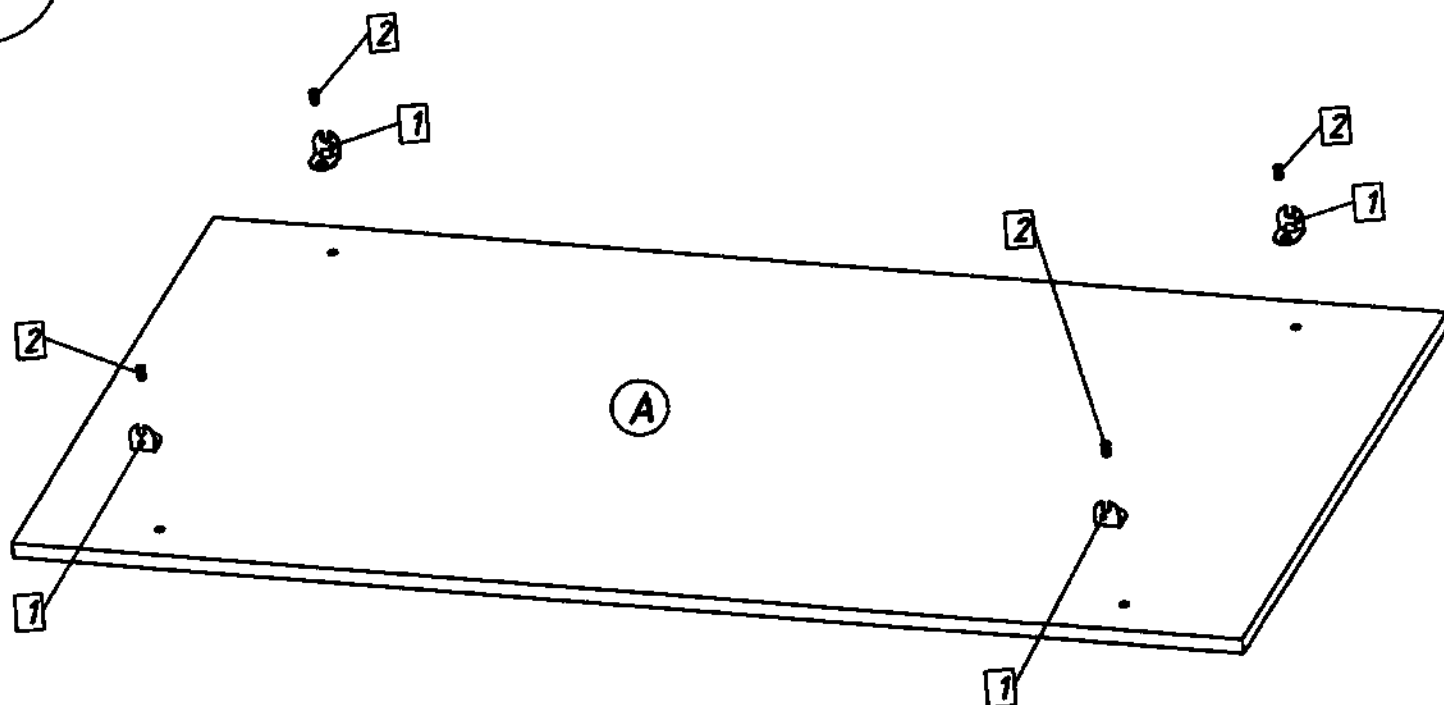


Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.8)

17 этап

Произведите установку ранее собранного каркаса тумбочки на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

Ах1 шт.

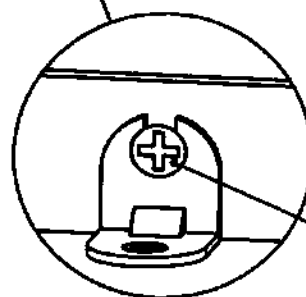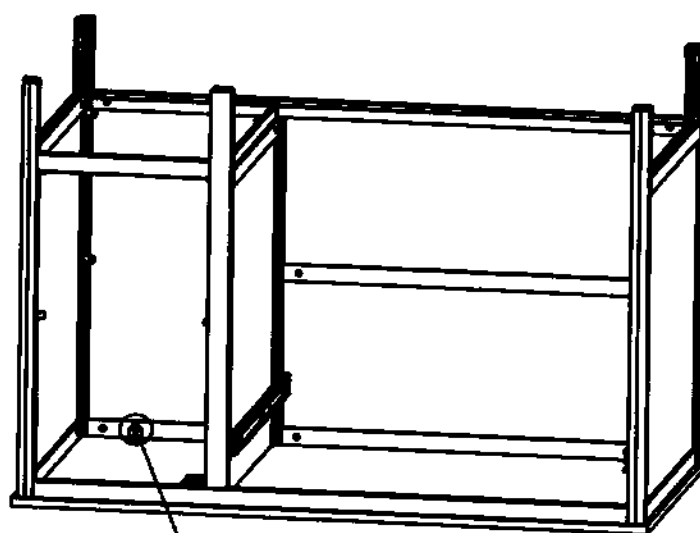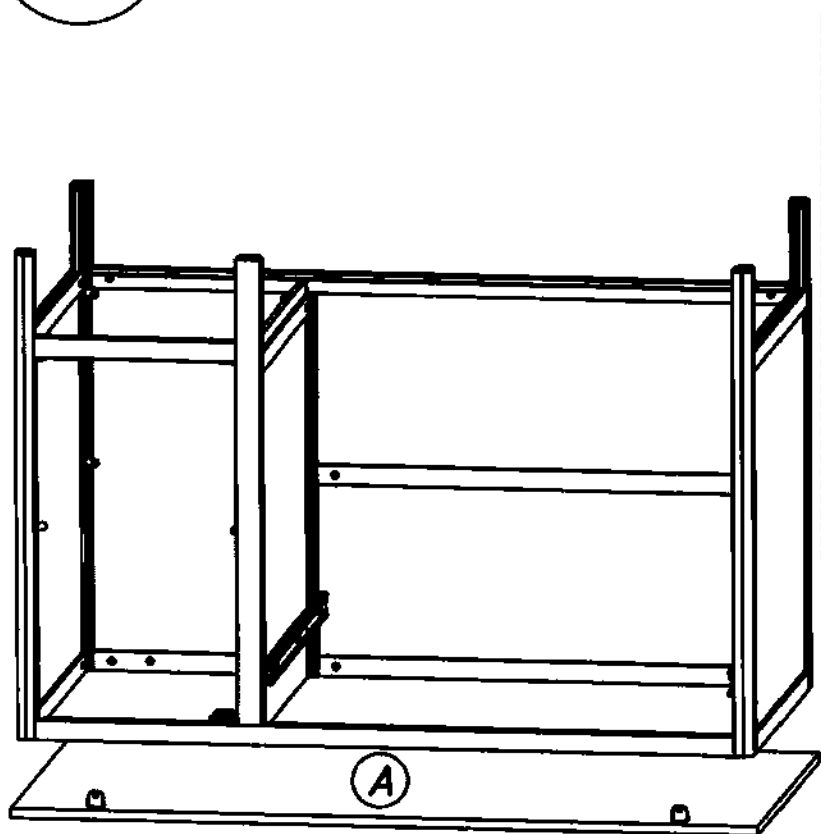


Затяните четыре винта в уголках для фиксации столешницы.

18 этап

Произведите установку опор, вкручивая их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

4x5 шт.
12x9 шт.


Опоры [4] следует закручивать рожковым ключом по часовой стрелке, либо плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ: Рожковый ключ, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

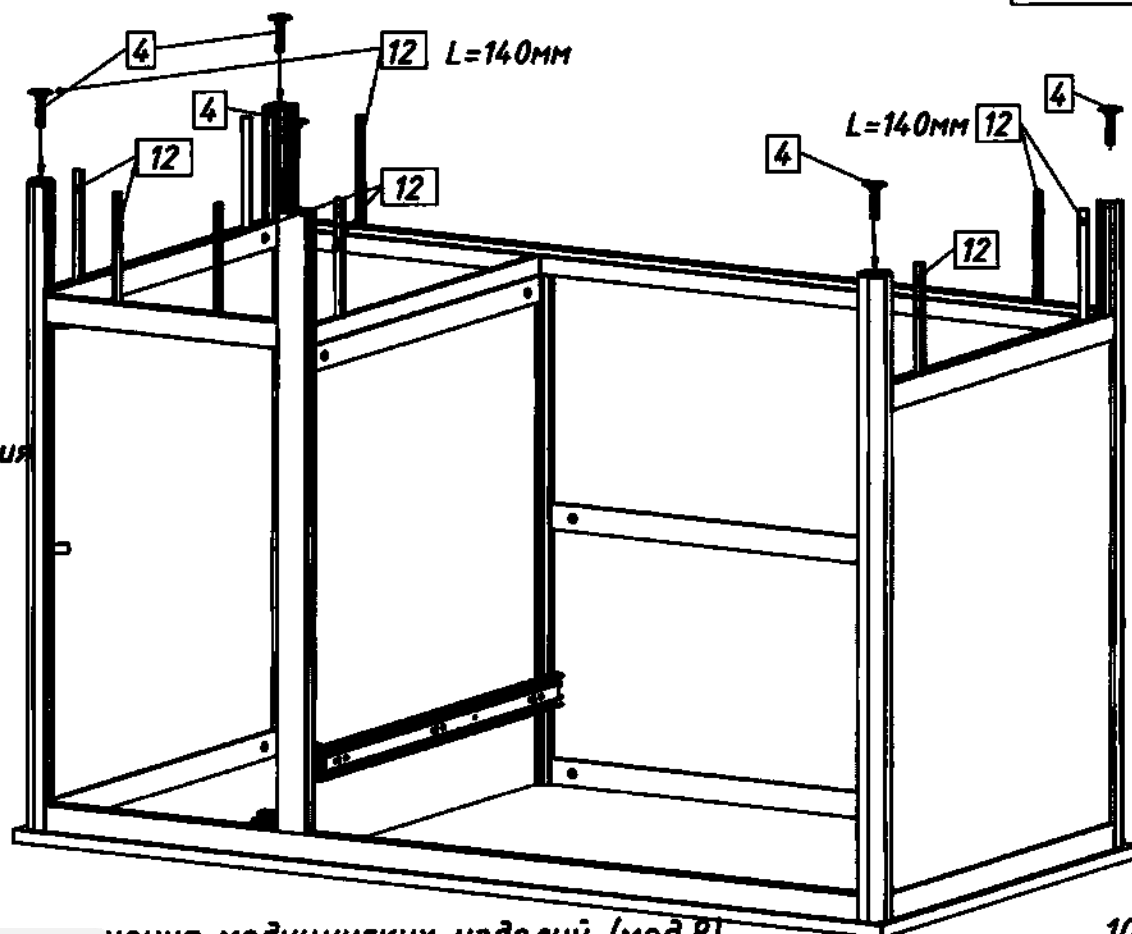

После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.

Произведите сборку деталей для каркаса выдвижного ящика
Соберите каждые стенки (О), (П), (Р) в 2-х экземплярах.


19 этап

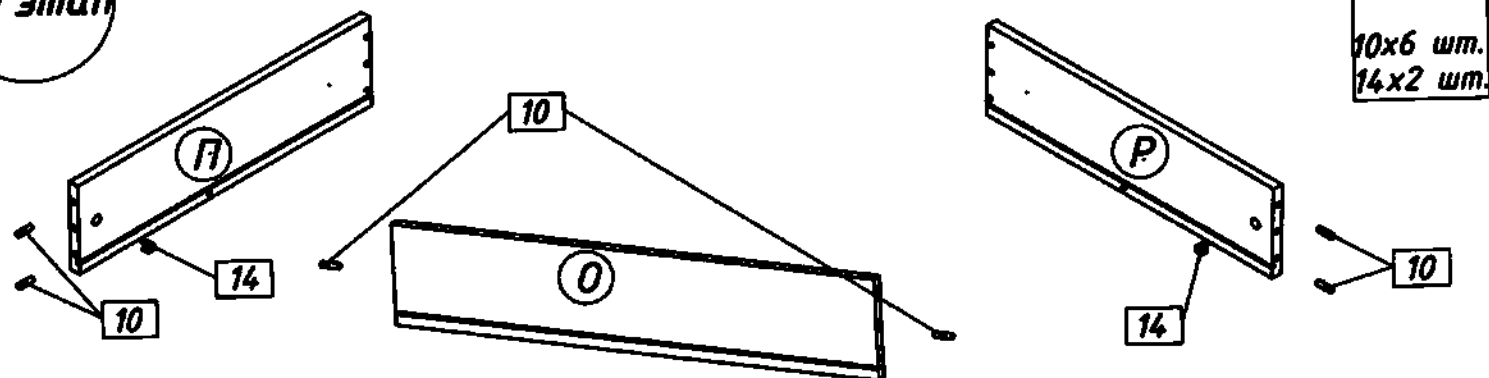

Произведите сборку каркаса выдвижного ящика

20 этап

0x1 шт.
Пx1 шт.
Рx1 шт.
3x4 шт.

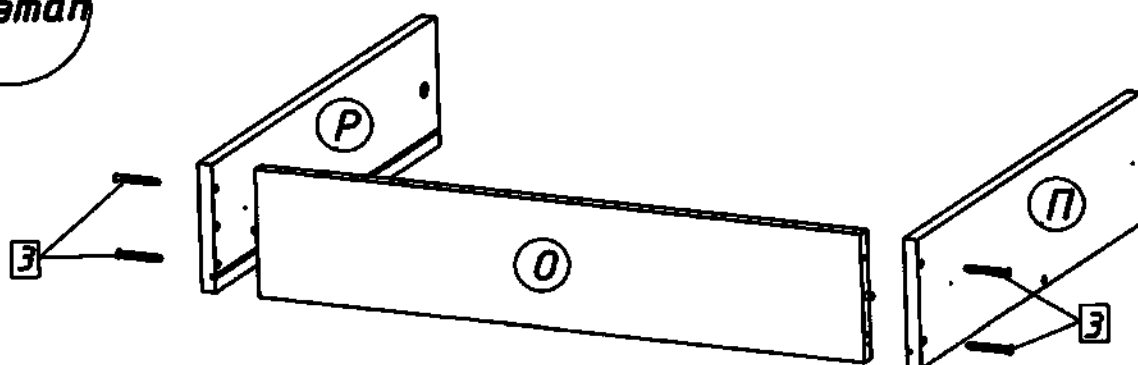



Произведите установку дна для каркаса выдвижного ящика

21 этап

Тx1 шт.


Окрашенная
сторона

Окрашенная
сторона

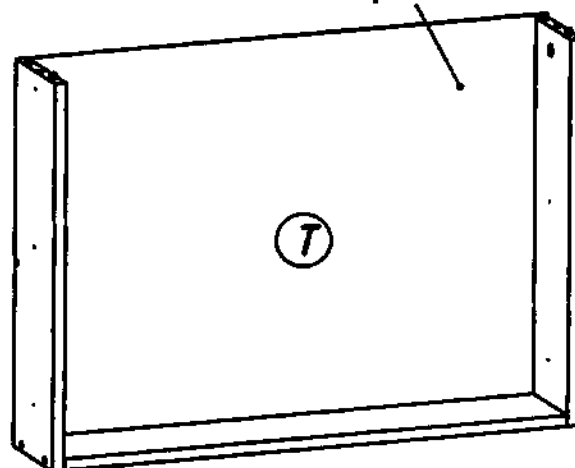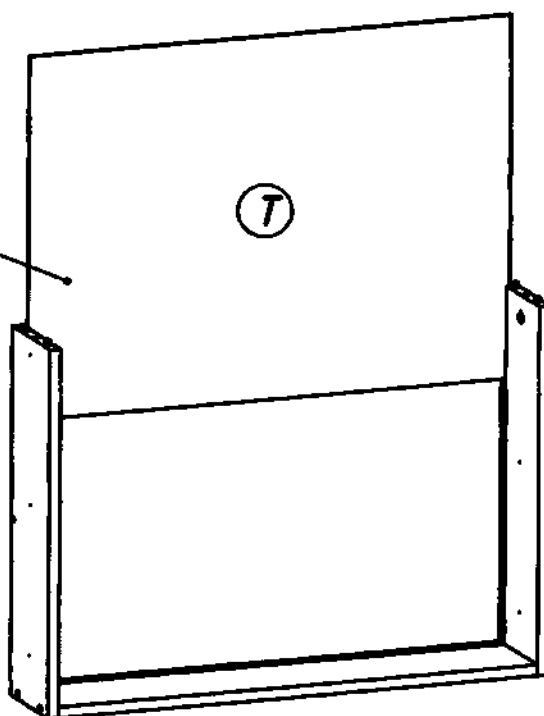

22 этап

Произведите установку
планки для каркаса
выдвижного ящика

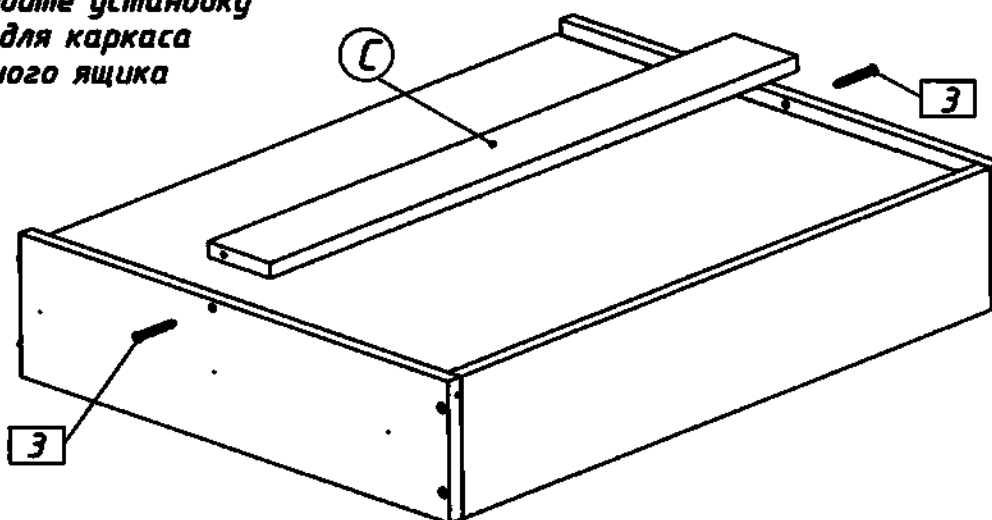


Сх1 шт.

3х2 шт.

23 этап

Произведите сборку фасада выдвижного ящика

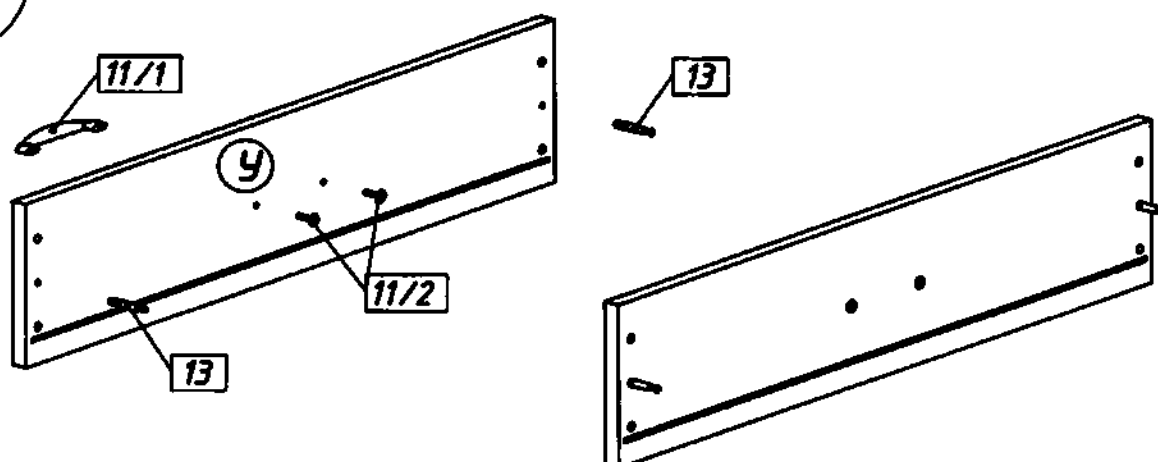

Ух1 шт.

11/1х1 шт.

11/2х2 шт.



13х2 шт.

24 этап

Произведите установку фасада выдвижного ящика

Схема фиксации фасада 9 и установки заглушек 15

9x1 шт.
15x2 шт.

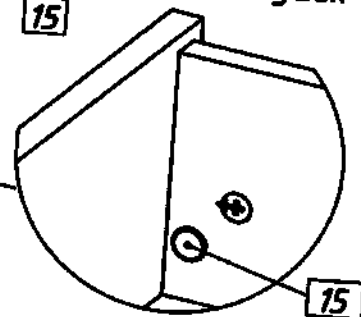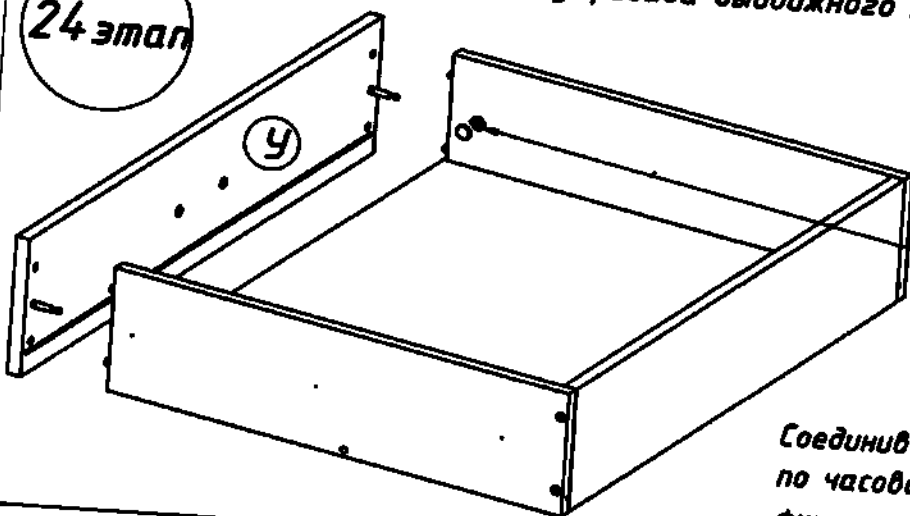


Соединив фасад 9 с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики 14 для его фиксации. Затем установите заглушки 15.

25 этап

Произведите сборку направляющих и их установку

8x6 шт.
9/1x2 шт.

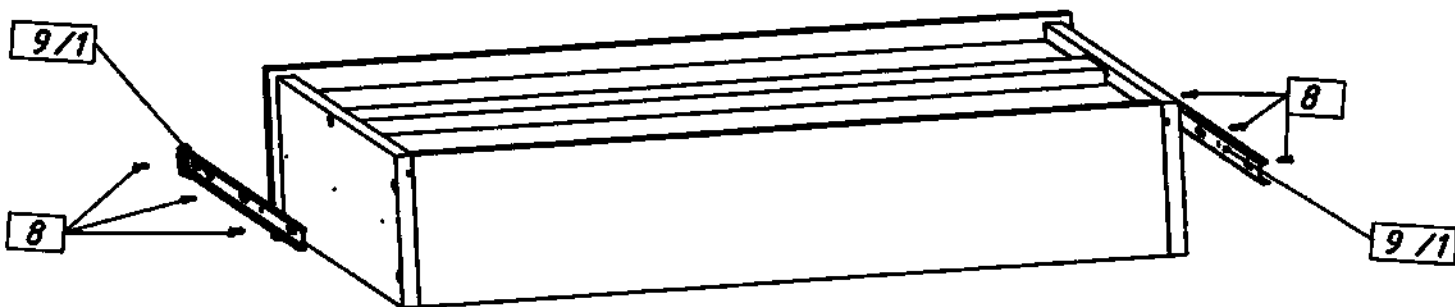

26 этап




Наклейте самоклеящийся логотип компании

27 этап

Произведите установку ответной планки магнита и ручки на дверь


Фx1 шт.
8x1 шт.
11/1x1 шт.
11/2x2 шт.
16/2x1 шт.

19x1 шт.

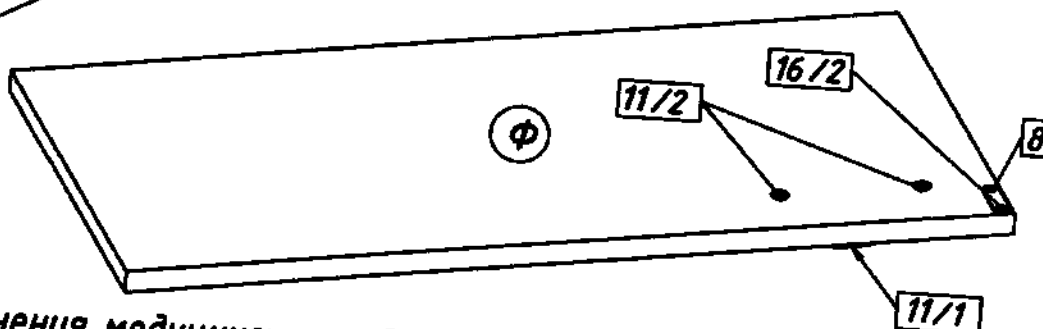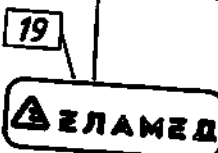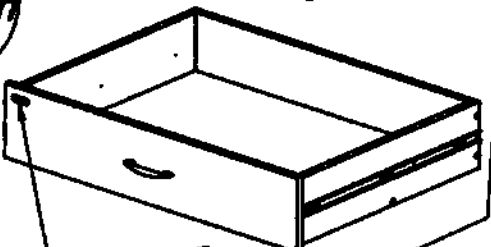

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.8)

28 этап

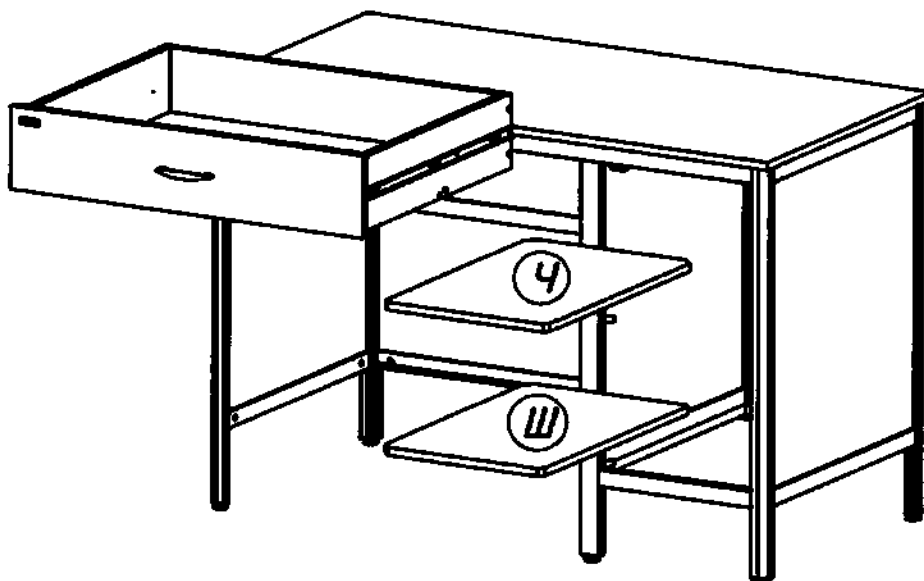


Произведите установку двери.


29 этап

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание повреждения двери стола её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед её установкой необходимо проверить – винты замков установленных прозогов надёжно затянуты, и стол не имеет диагональных перекосов;
– наличие в каждой петле [18] пластиковых колпачков на затяжных винтах.
Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!!!**

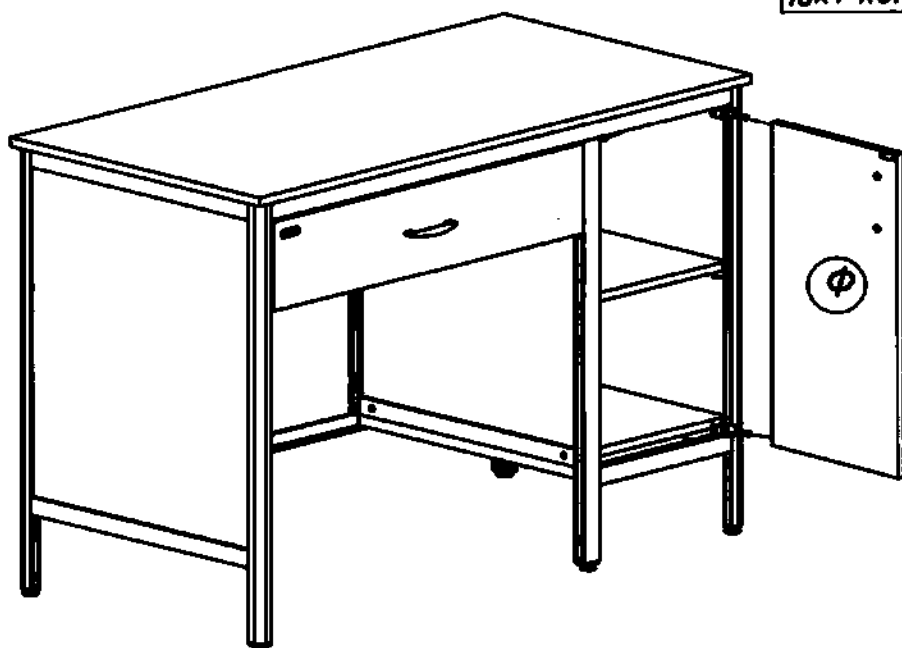
Фх1 шт.
18х1 компл.

Установите нижнюю петлю [19]

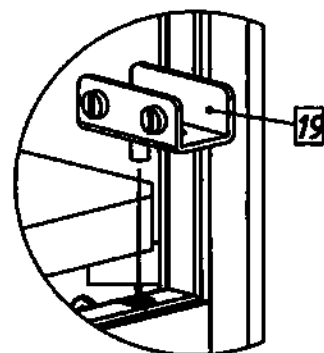


Установив верхнюю петлю [19] и придерживая её от выпадения, вставьте между петель дверь без перекосов.

Схема установки двери в петле

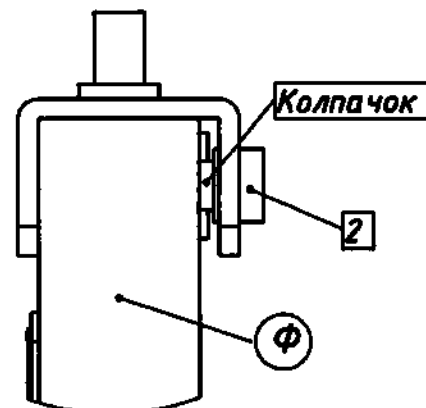

Внимание: Установку двери производить только в вертикальном положении стола. После установки двери необходимо затянуть все фиксирующие винты петель [2] до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

30 этап

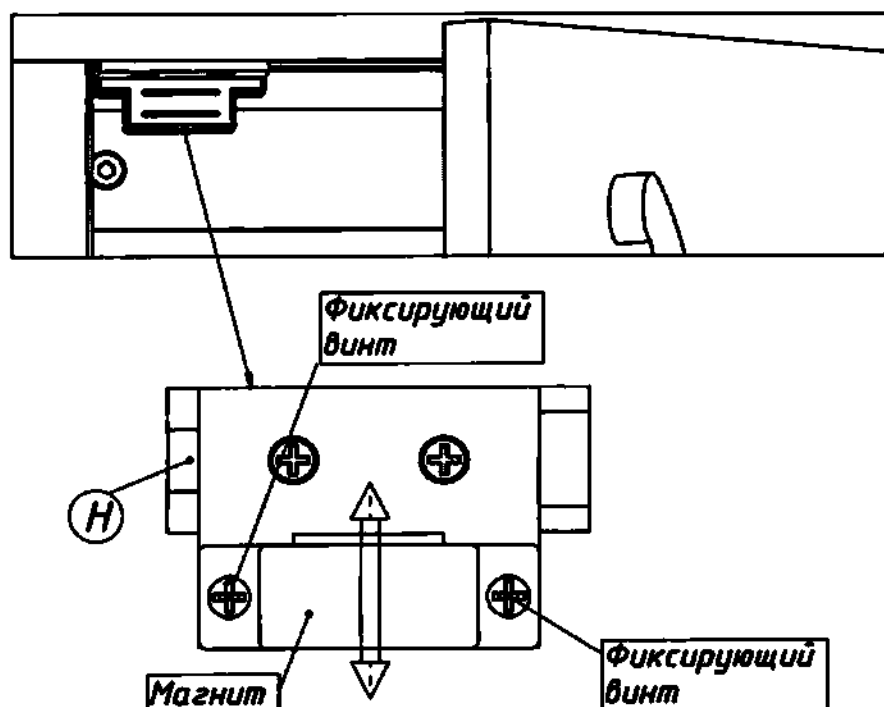

Открыв дверь из ЛДСП, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магнит. После завершения регулировки затяните на магните фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на магните. Это может привести к порче его корпуса.

Дверь в закрытом положении




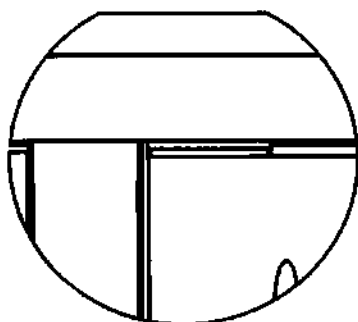


Схема фиксации двери магнитом

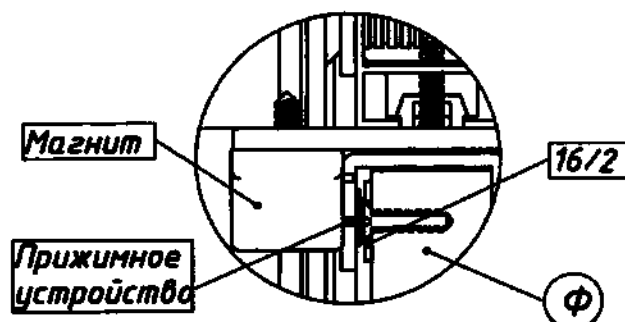

Сборка изделия завершена

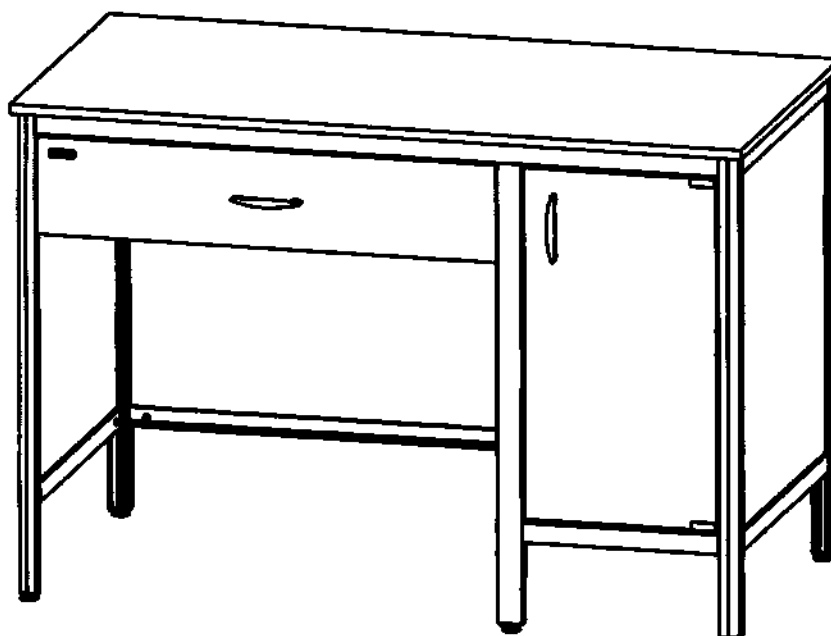

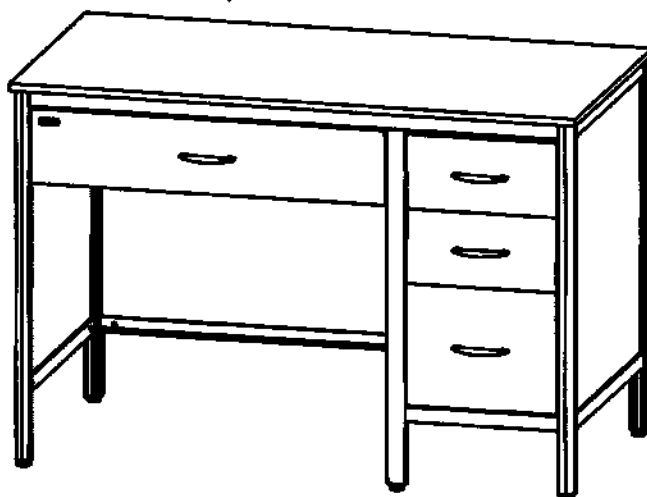

Условные обозначения:

А-Я : детали

2. [1] - [16] : крепёж и фурнитура






3. (1) - (35) : этапы сборки

Код товара: _____

Детали

№	Наименование	
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон нижний передний	1
Д	Прогон нижний задний	1
Е	Стойка передняя	1
Ж	Стойка задняя	1
З	Стенка задняя левая	2
И	Стенка задняя правая	1
К	Прогон задний левый	1
Л	Прогон верхний задний левый	1
М	Прогон задний правый	1
Н	Прогон верхний передний	1
О	Стенка задняя выдвижного ящика	2
П	Стенка левая выдвижного ящика	3
Р	Стенка правая выдвижного ящика	3
С	Планка выдвижного ящика	3
Т	Дно выдвижного ящика	3
У	Фасад выдвижного ящика	2
Ф	Стенка задняя выдвижного ящика нижнего	1
Х	Стенка левая выдвижного ящика нижнего	1
Ц	Стенка правая выдвижного ящика нижнего	1
Ч	Фасад выдвижного ящика нижнего	1
Ш	Стенка задняя выдвижного ящика левого	1
Щ	Планка выдвижного ящика левого	1
Э	Дно выдвижного ящика левого	1
Ю	Фасад выдвижного ящика левого	1
Я	Перегородка	1

Крепёж и фурнитура

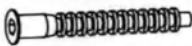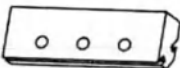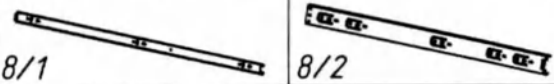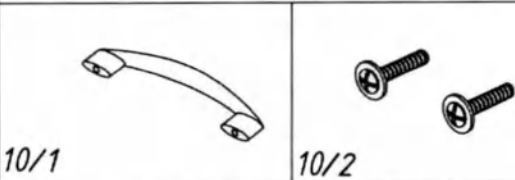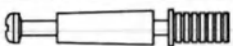Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4	Евровинт 6,3х13	
3	24	Конфирмат	
4	5	Опора	
5	8	Саморез 3х20	
6	8	Площадка под направляющие	
7	40	Саморез 3х12	
8	4 комплекта	Направляющие	
9	24	Шкант мебельный	
10	4 комплекта	Ручка мебельная	
11	-	Заглушка декоративная	
12	8	Шток эксцентрика	
13	8	Эксцентрик	
14	8	Заглушка эксцентрика	
15	1	Логотип компании	
16*	1	Ключ шестигранный	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы 3 закручивать ключом шестигранным 16 заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Схема сборки изделия**Произведите сборку стенки левой****1 этап**

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

5x1 шт.


5x1 шт.

6x1 шт.

7x2 шт.

8/2x1 шт.

11x1 шт.

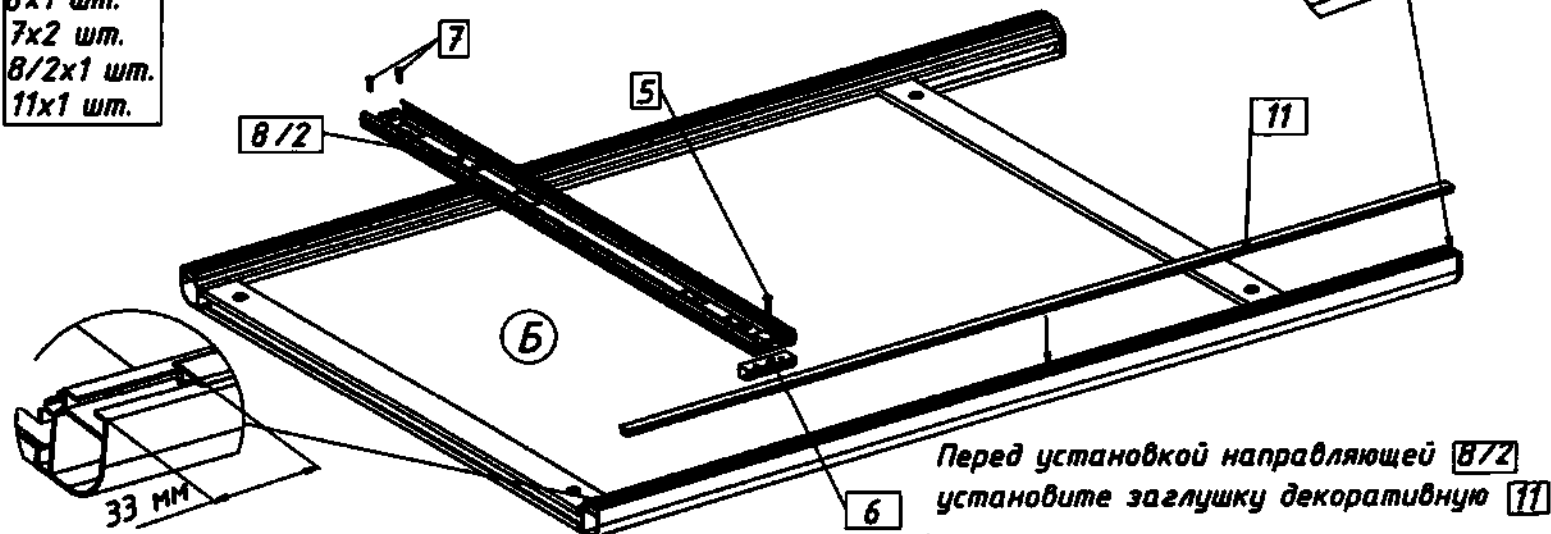

Перед установкой направляющей 8/2 установите заглушку декоративную 11

Площадку под направляющие 6 вставьте в паз стойки. Среднее отверстие в площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.

2 этап**Произведите сборку стенки правой**

8x1 шт.


5x3 шт.

6x3 шт.

7x6 шт.

8/2x3 шт.



11x1 шт.

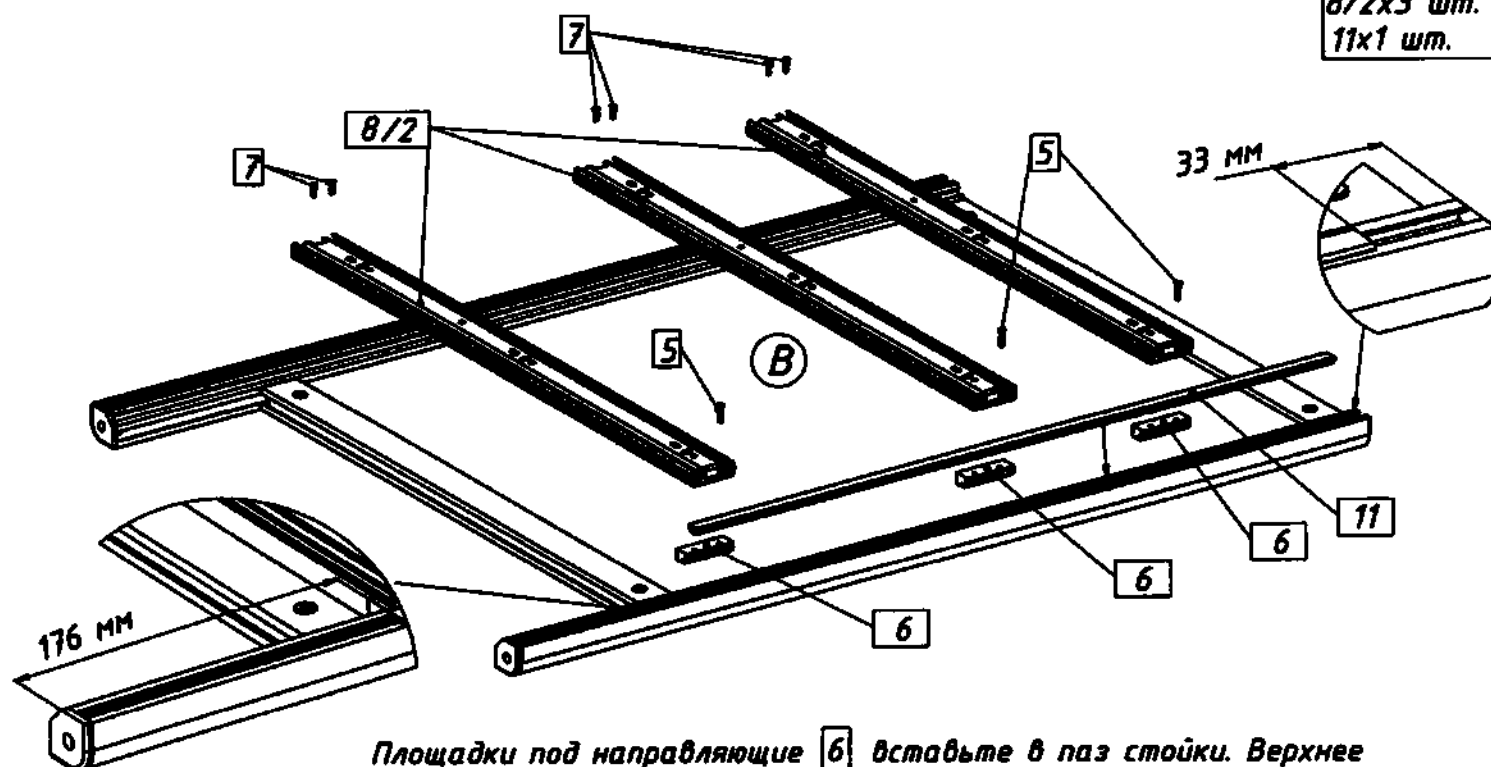

Площадки под направляющие 6 вставьте в паз стойки. Верхнее отверстие в каждой площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.

3 этап

Схема установки заглушек 11 в стойку

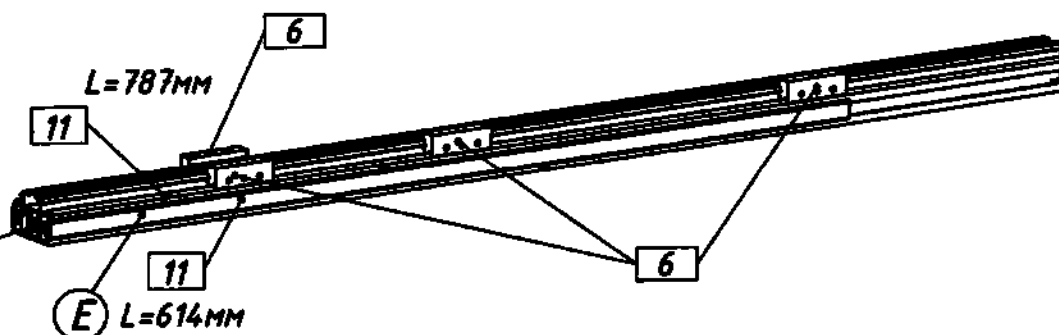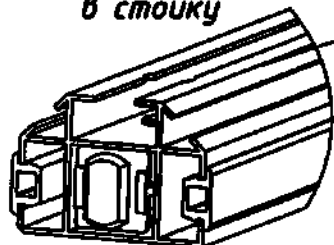

Площадки под направляющие 6 вставьте в паз стойки. Среднее отверстие площадок 6 совместите с отверстием под направляющую в стойке.


4 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего (Г)

Схема установки заглушки 11

Гх1 шт.

11х1 шт.

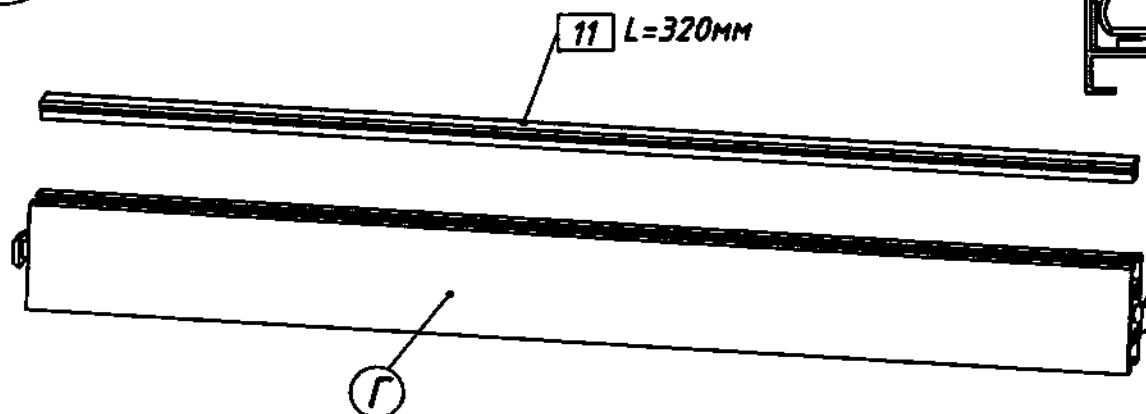

5 этап

Произведите сборку прогона переднего верхнего (Н)

Нх1 шт.

11х1 шт.


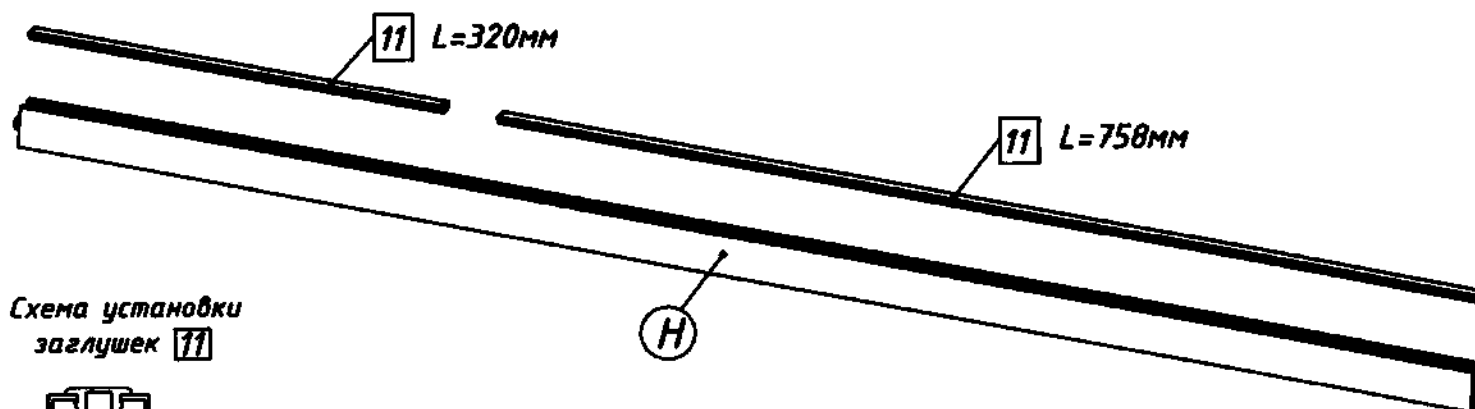



Схема установки заглушек 11

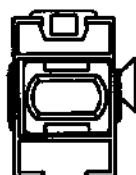

6 этап


Ослабьте замки в прогоне нижнем заднем (Д) с помощью ключа [16]. Вставьте прогоны в стенки (Б) и (В). После этого поверните прогоны на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков прогонов находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Бх1 шт.
Вх1 шт.
Дх1 шт.

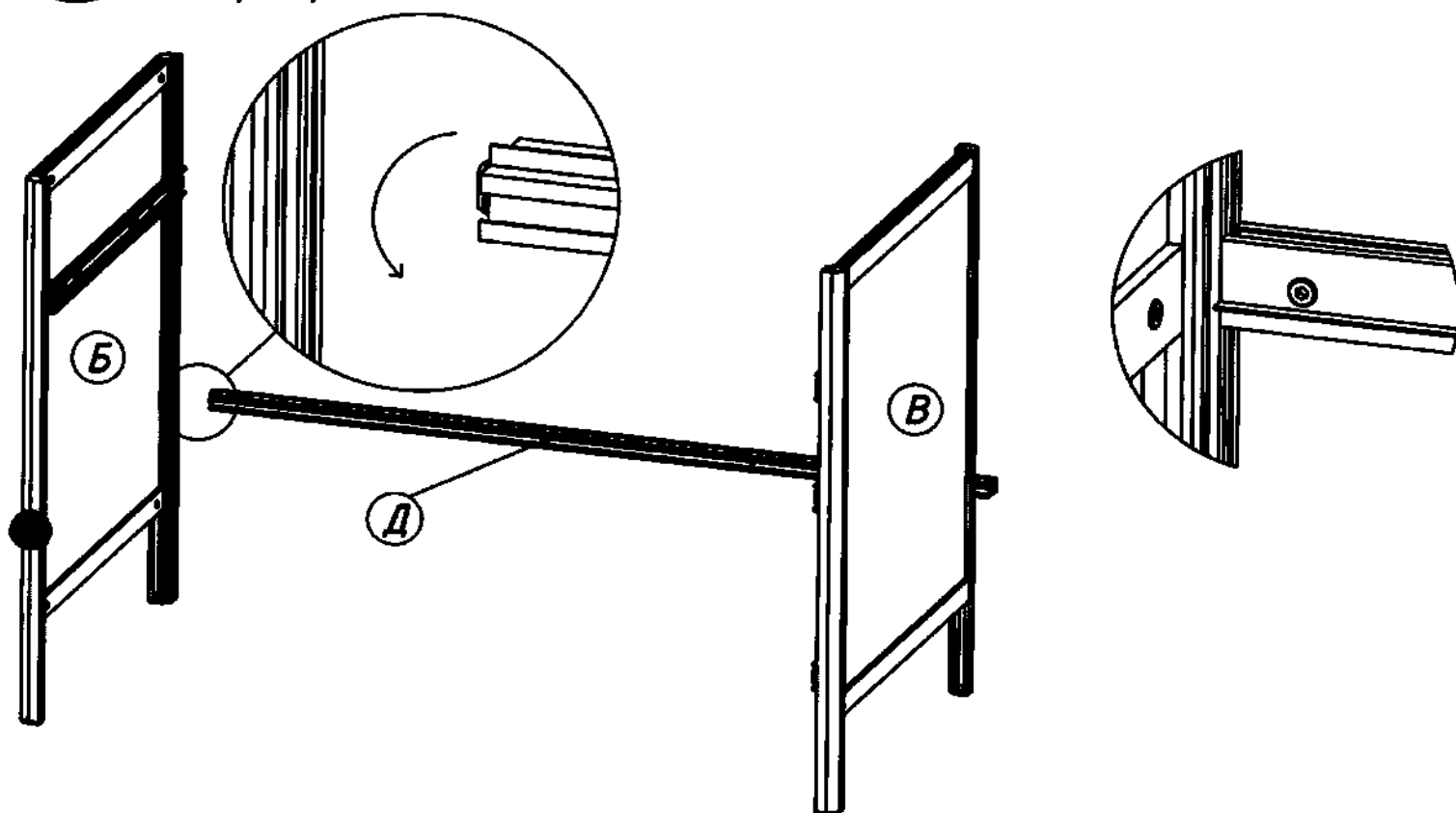

7 этап



Ослабьте замок в стойке задней (Ж) с помощью ключа [16]. Вставьте стойку по центру прогона (Д) и после этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винт замка стойки находился с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винт замка стойки, но не до полной фиксации, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки (Ж) при установке стенок задних.

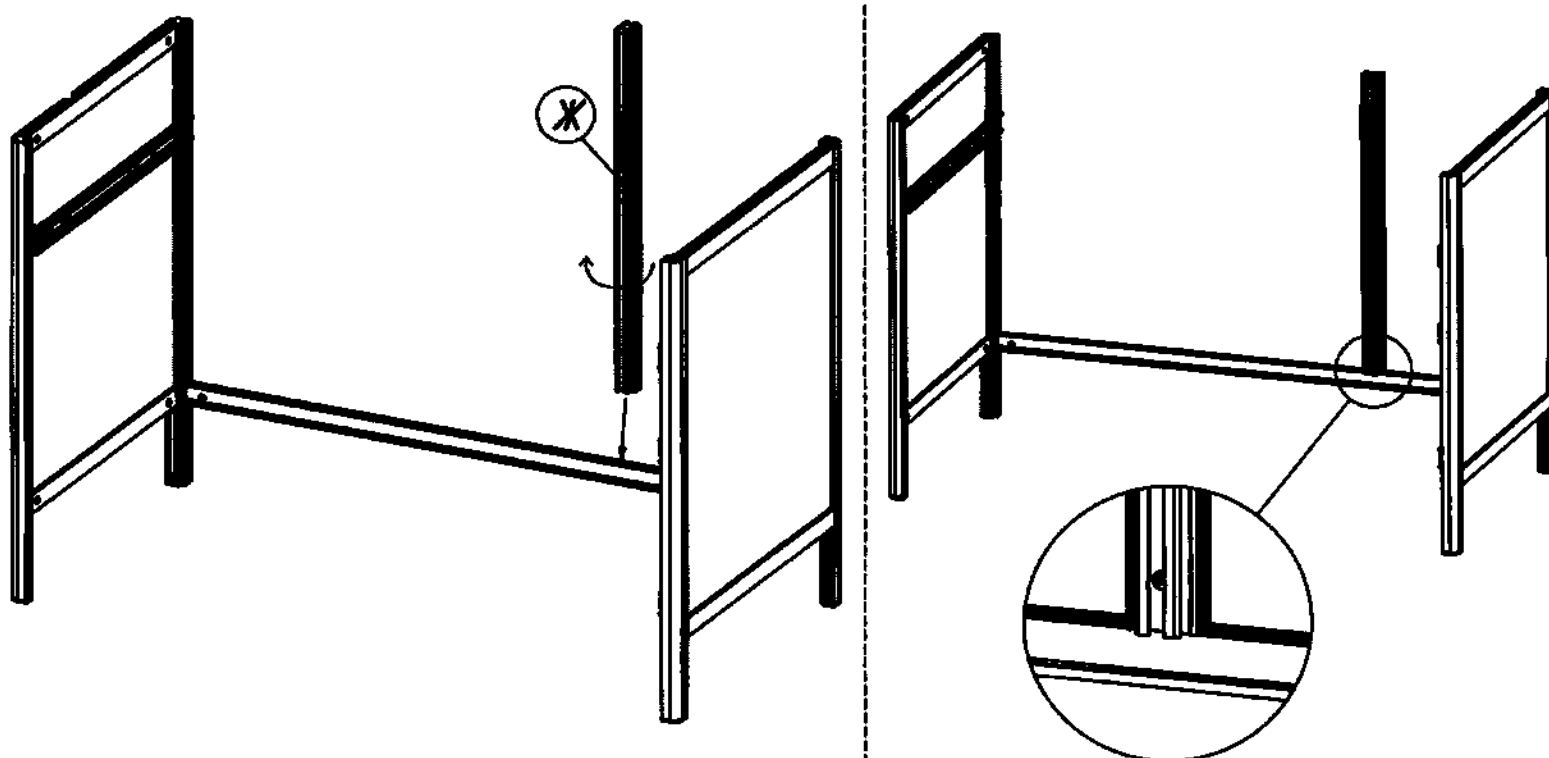

Произведите установку прогона верхнего переднего (Н) таким образом, чтобы винты замков прогона (Н) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона (Н), тем самым зафиксировав его на стенках.

Нх1 шт.



8 этап

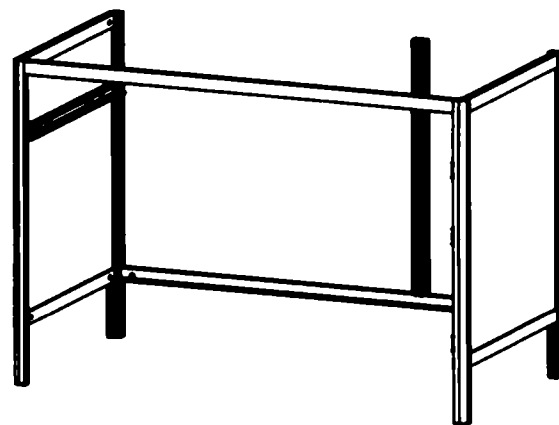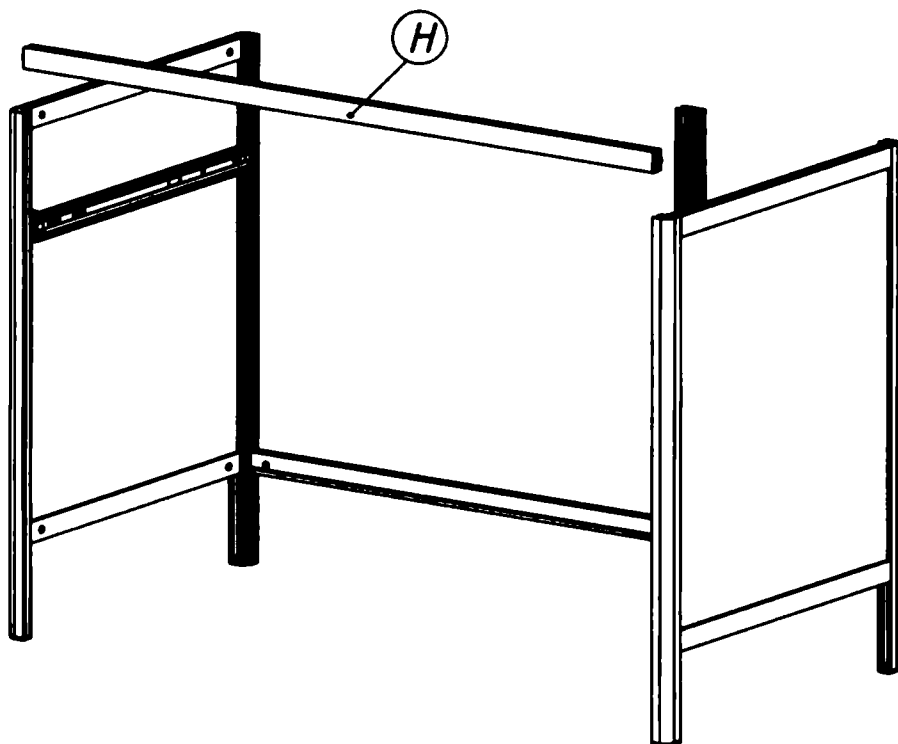

9 этап

Ослабьте замки в стойке передней (Е) с помощью ключа 16. Вставьте стойку по центру прогона (Н). После этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков стойки находились с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винты замков стойки, но не до полной фиксации стойки на прогонах, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стойки.

Ех1 шт.

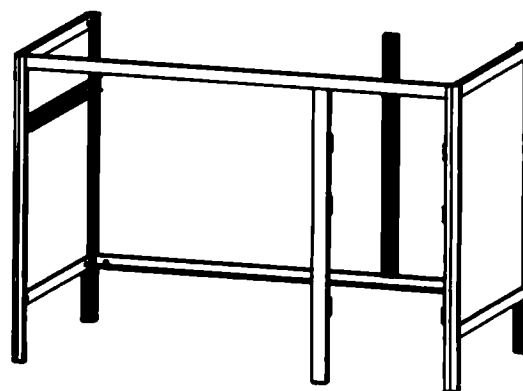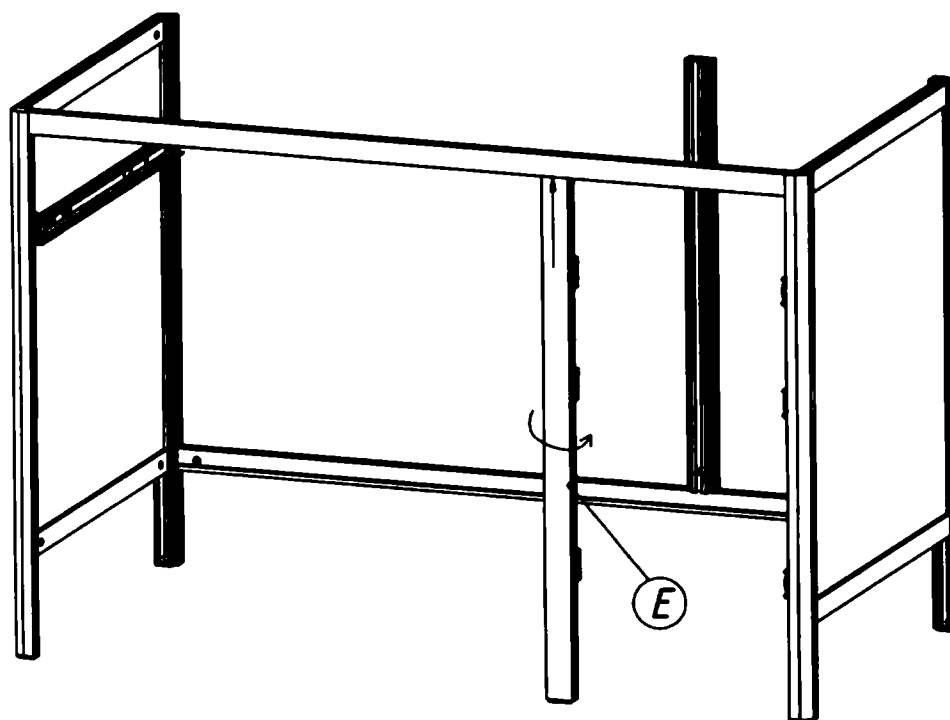

ОМ.29.777.03

Произведите установку направляющих и прогона нижнего переднего (Г)


Гх1 шт.

5х4 шт.

7х8 шт.

8/2х4 шт.



10 этап

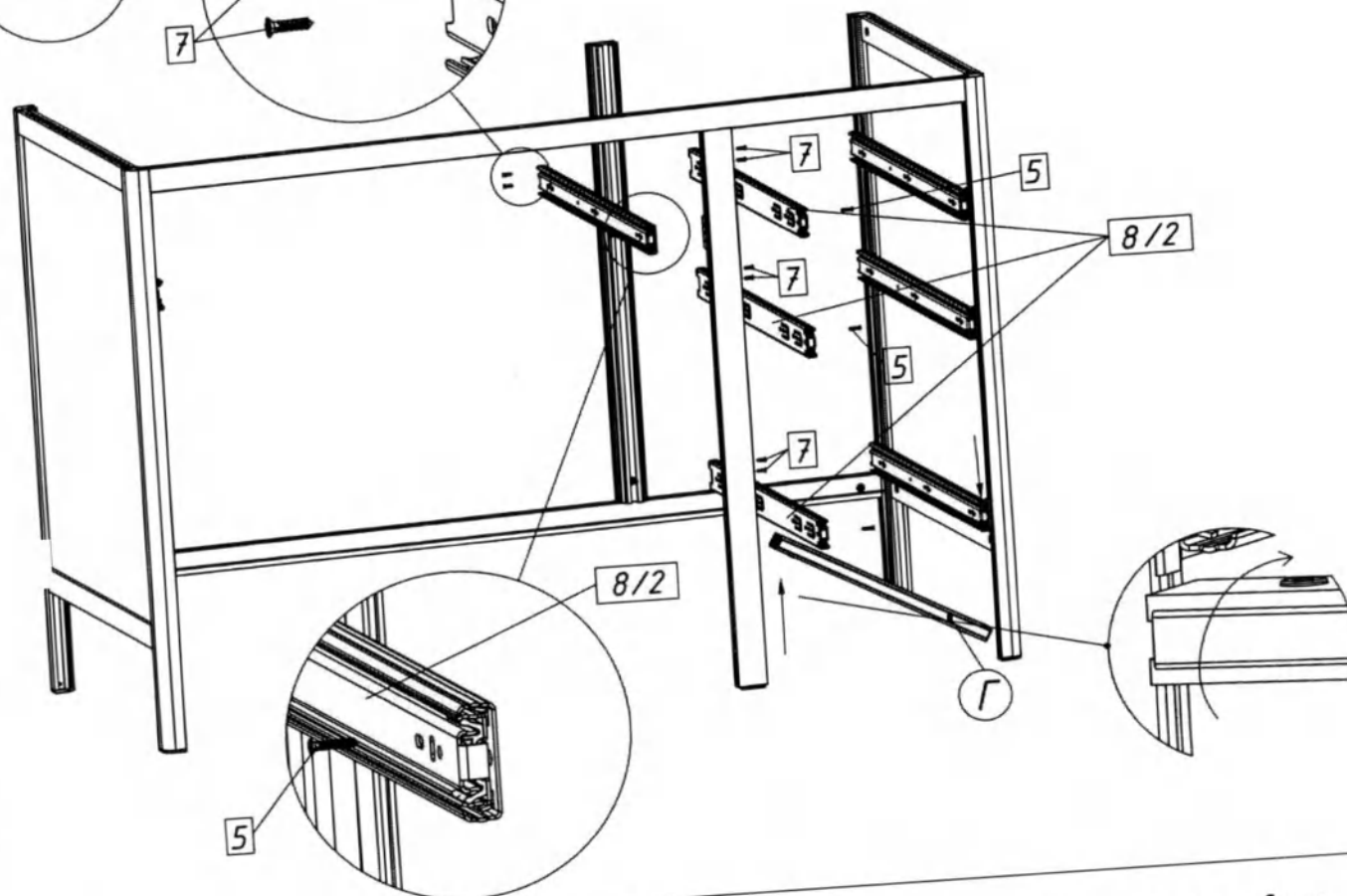

11 этап

Произведите установку стенки задней левой (З) и прогона заднего левого (К). Далее затяните винты замков прогона.

Зх1 шт.
Кх1 шт.

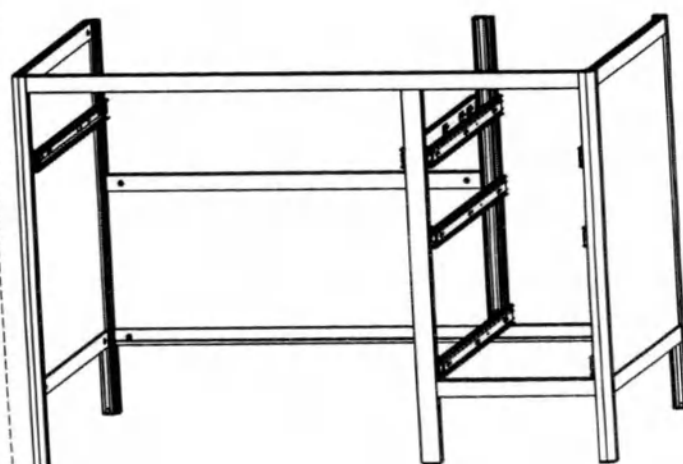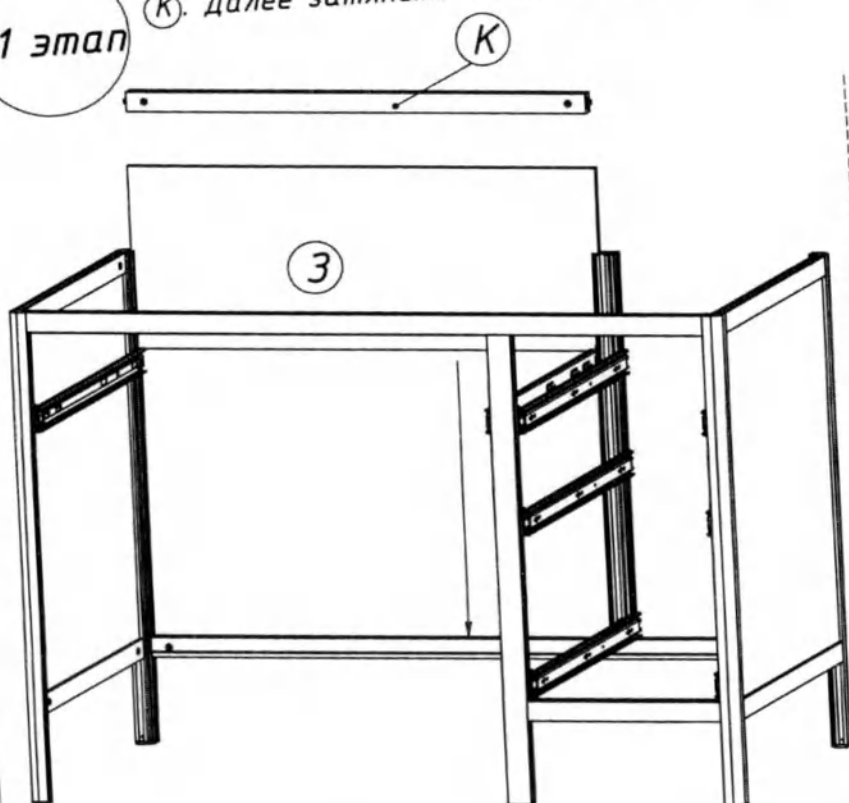

ВНИМАНИЕ: после данного этапа сборки необходимо затянуть винты замков стойки задней (Ж) и стойки передней (Е), тем самым окончательно зафиксировав их.



Стел для размещения и хранения медицинских изделий (мод.9)

ОМ.29.777.03

Произведите установку стенки задней левой (З) и стенки задней правой (И)

Зx1 шт.
Иx1 шт.



12 этап

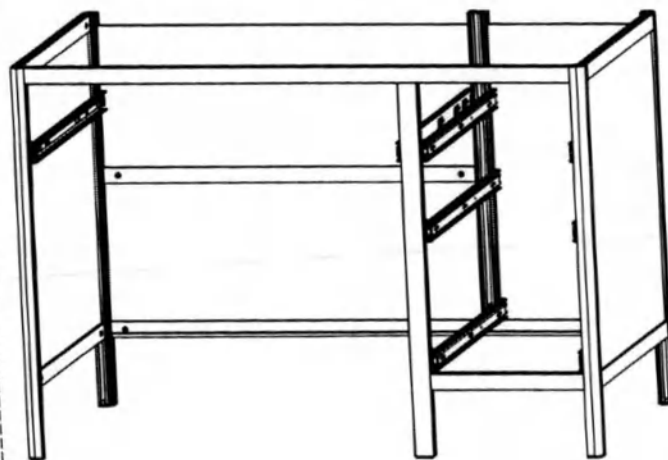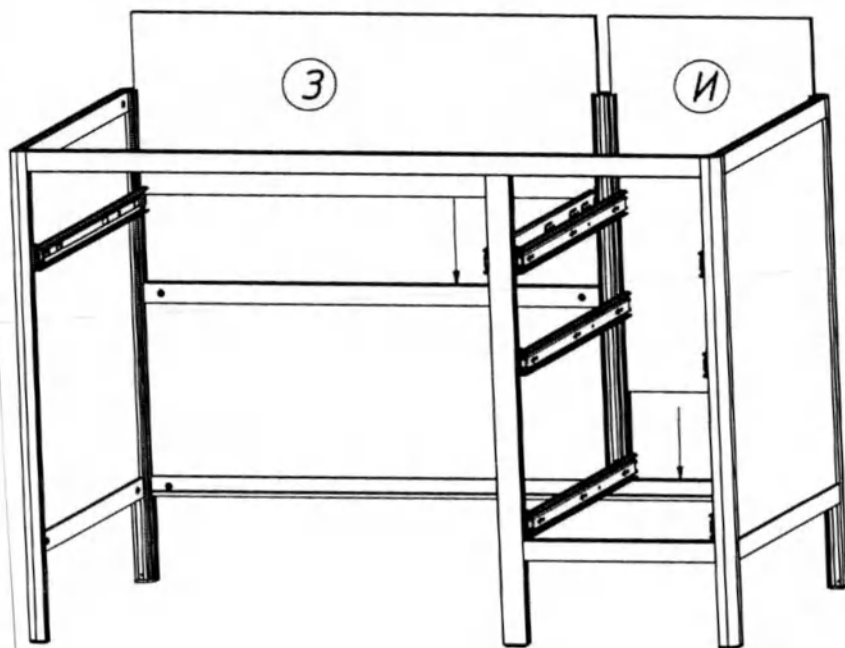

13 этап

Произведите установку прогона верхнего заднего левого (Л) и прогона верхнего заднего правого (М) таким образом, чтобы винты замков прогонов (Л) и (М) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Лx1 шт.
Мx1 шт.

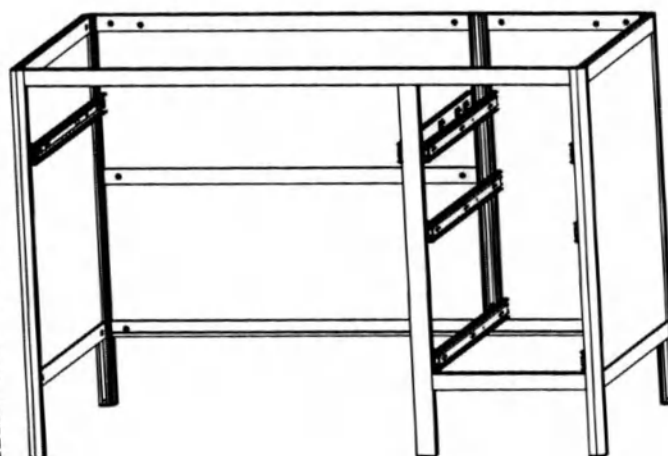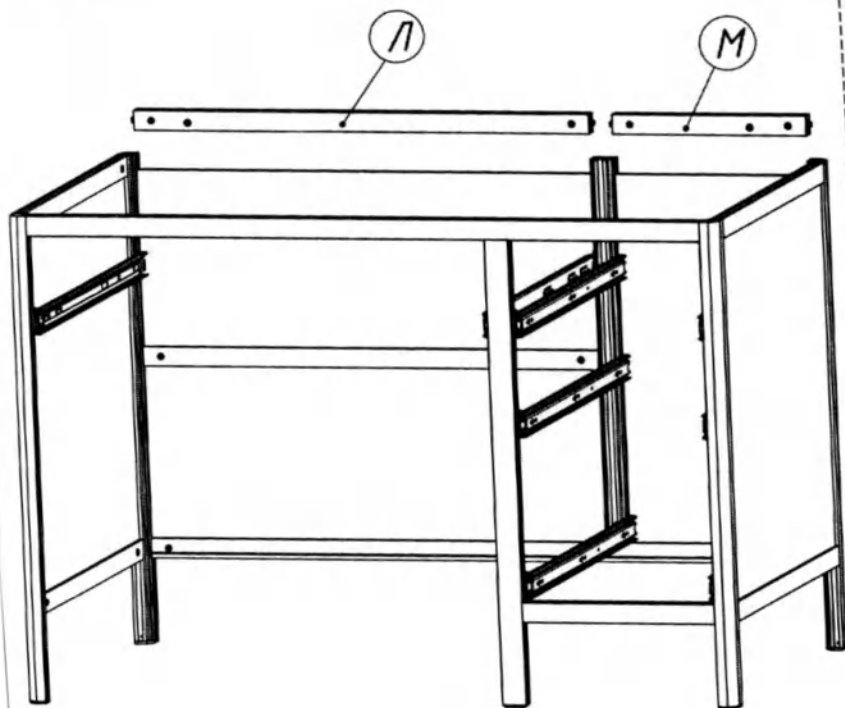



Стел для размещения и хранения медицинских изделий (мод.9)

ОМ.29.777.03

Произведите установку перегородки (Я) в пазы стойки задней (Ж) и стойки передней (Е)

14 этап


Ях1 шт.

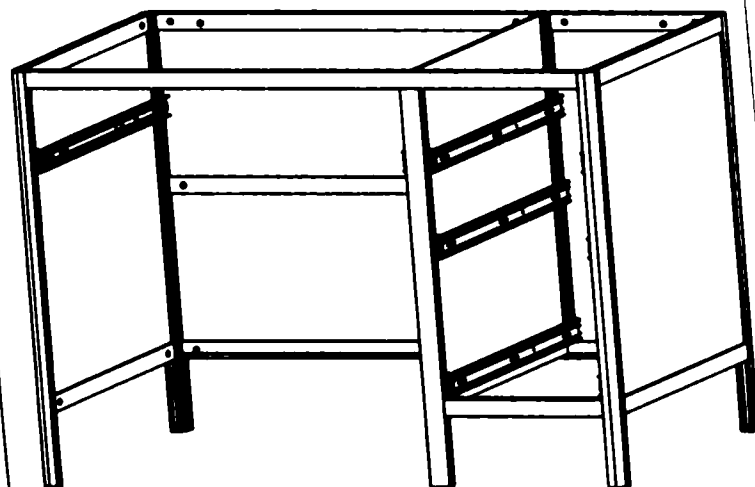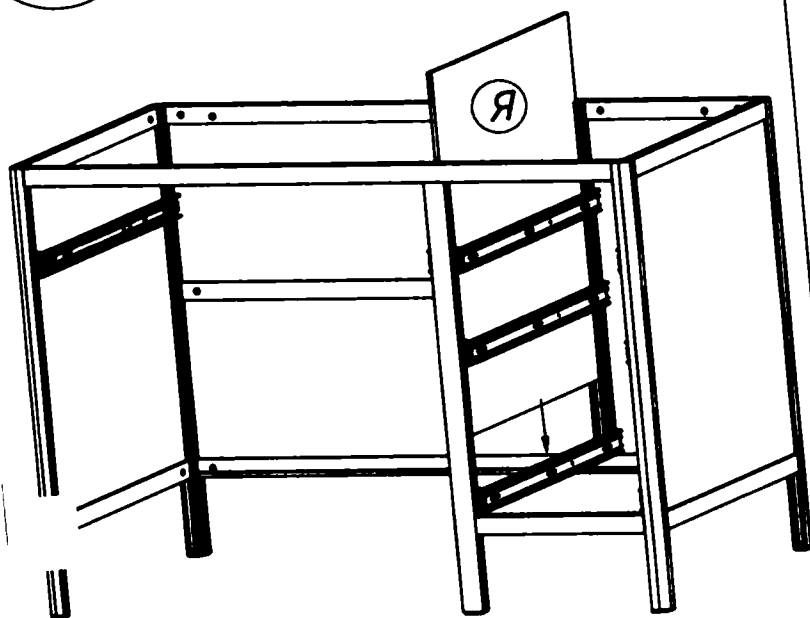

Произведите сборку столешницы

15 этап




Ах1 шт.
2х4 шт.
1х4 шт.

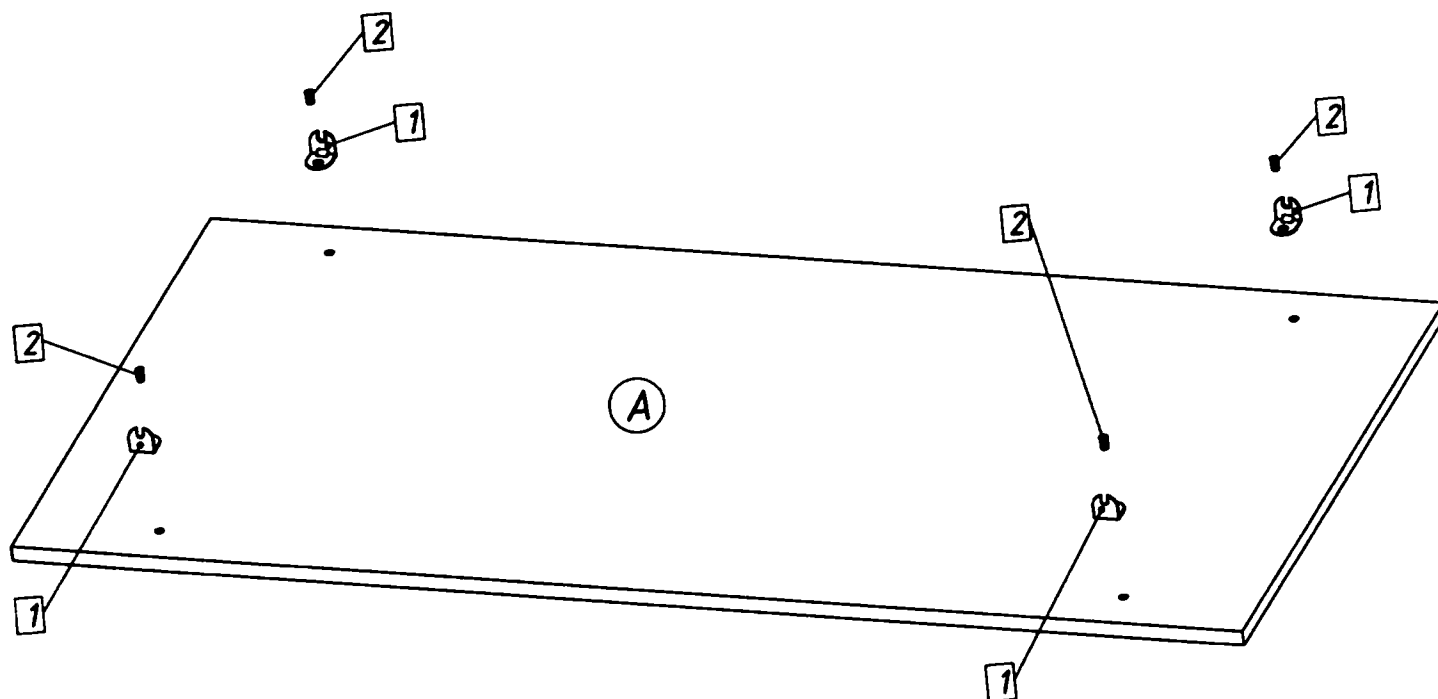

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.9)

16 этап

Произведите установку ранее собранного каркаса тумбочки на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

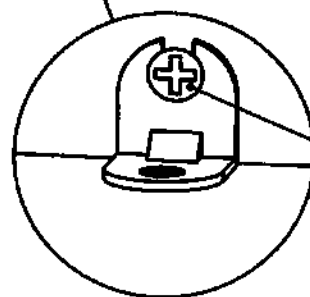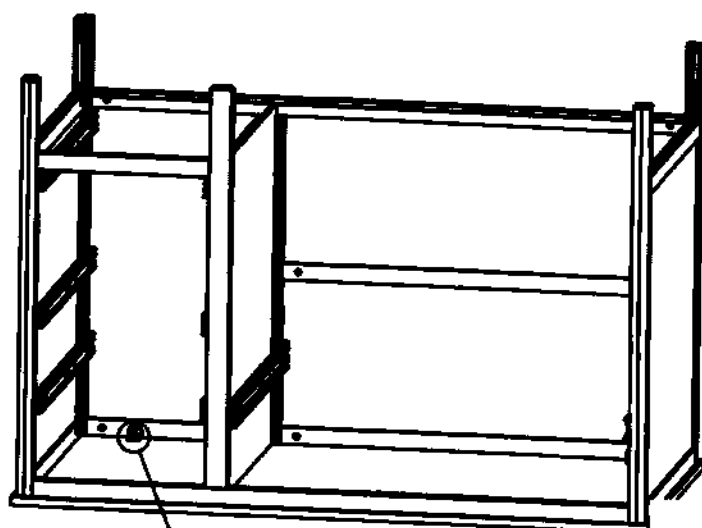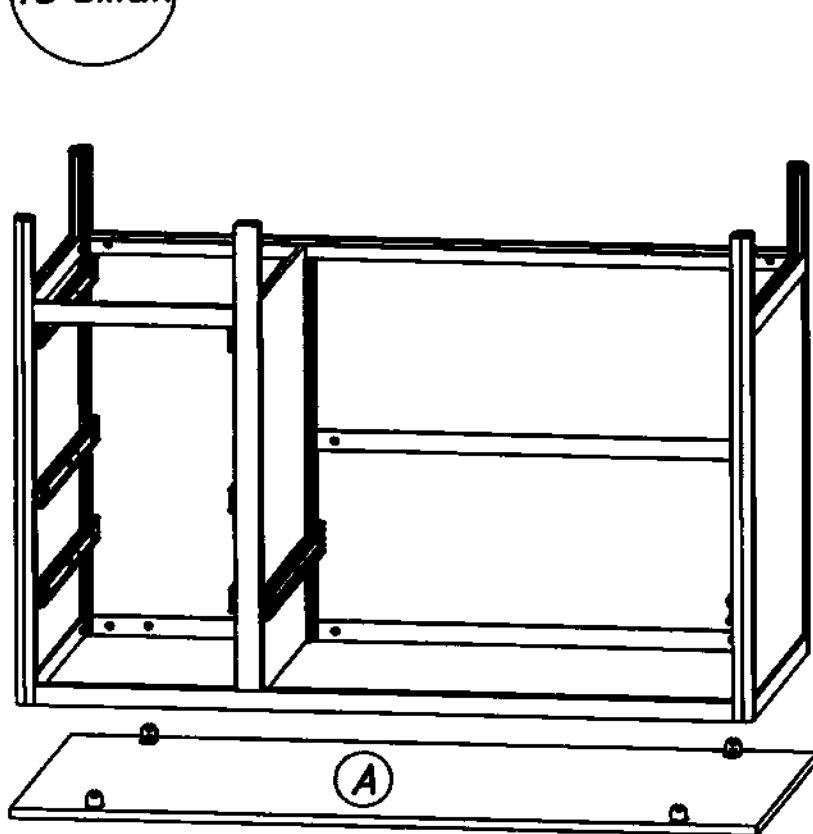

Затяните четыре винта в уголках для фиксации столешницы.

17 этап


Произведите установку опор, вкручивая их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

4x5 шт.
11x9 шт.

Опоры 4 следует закручивать рожковым ключом по часовой стрелке, либо плоскогубцами.

ВНИМАНИЕ:

Рожковый ключ плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

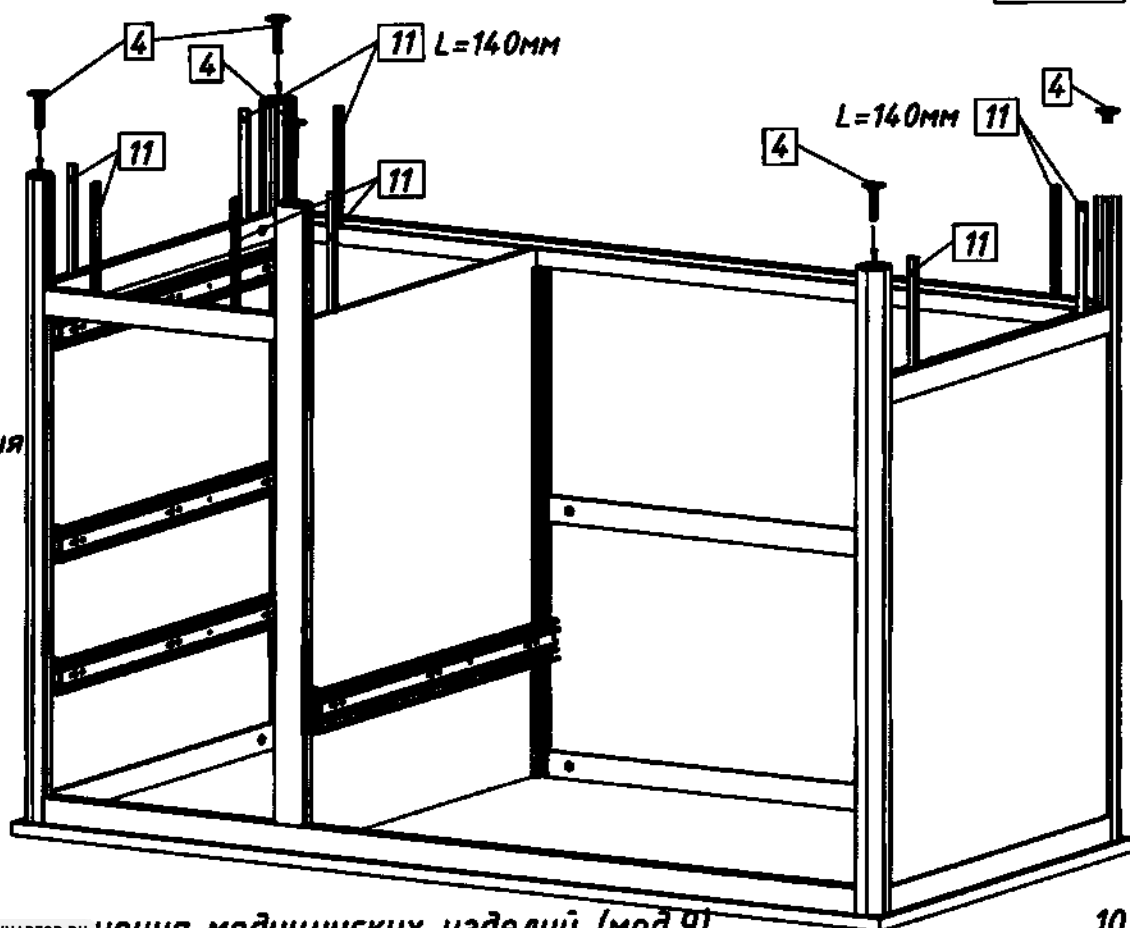


После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.

18 этап

Произведите сборку деталей для каркаса малых выдвижных ящиков
Соберите каждые стенки ①, ②, ③ в 2-х экземплярах.

0x1 шт.
Пх1 шт.
Рх1 шт.
9x6 шт.
13x2 шт.

x2

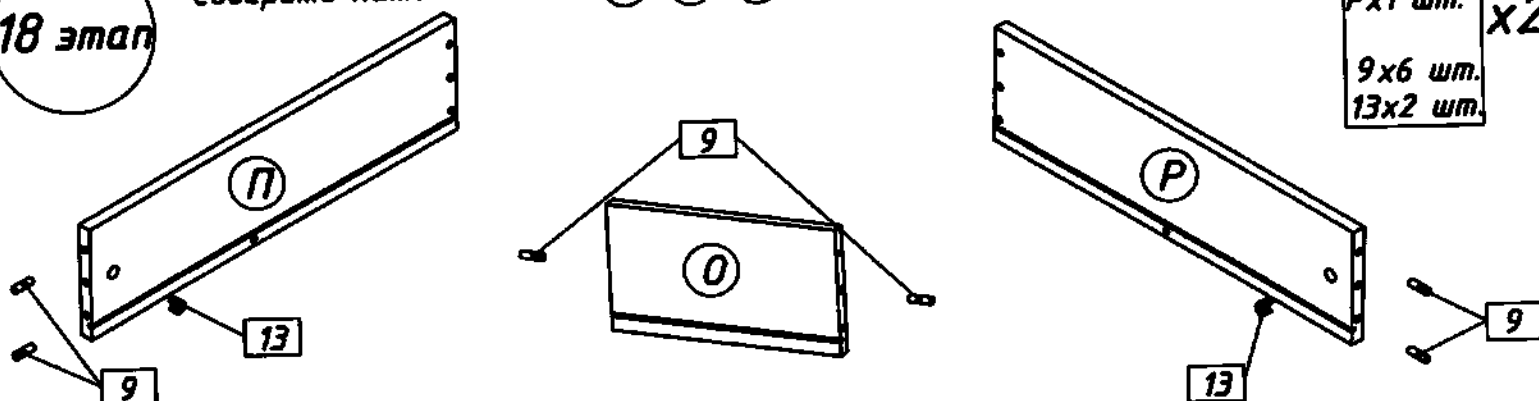


17 этап

Произведите сборку каркаса малых выдвижных ящиков в 2-х экземплярах

0x1 шт.
Пх1 шт.
Рх1 шт.
3x4 шт.

x2

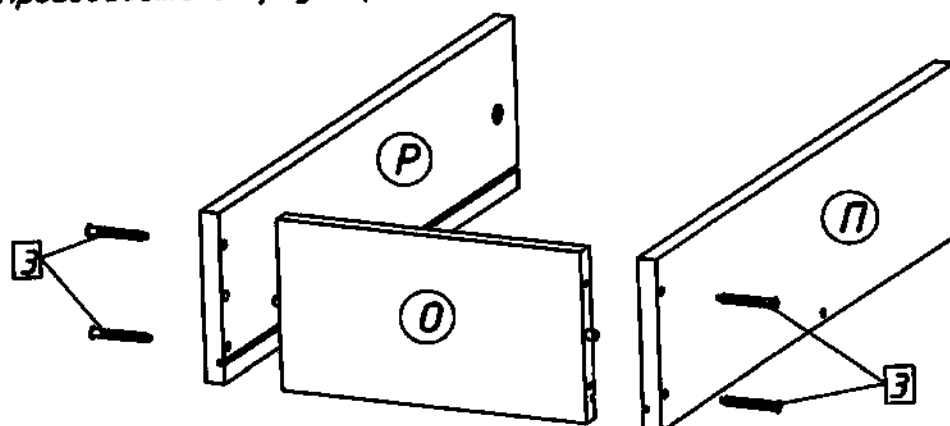

Произведите установку дна для каркасов 2-х малых выдвижных ящиков


Тх1 шт. x2

16 этап

Окрашенная
сторона




Окрашенная
сторона

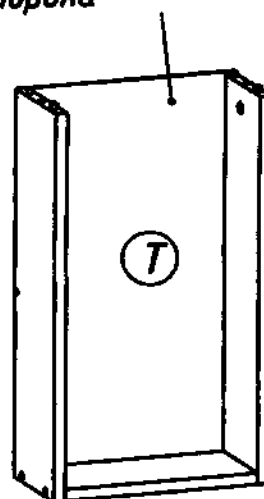

21 этап

Произведите установку
планки для каркасов
2-х малых выдвижных ящиков


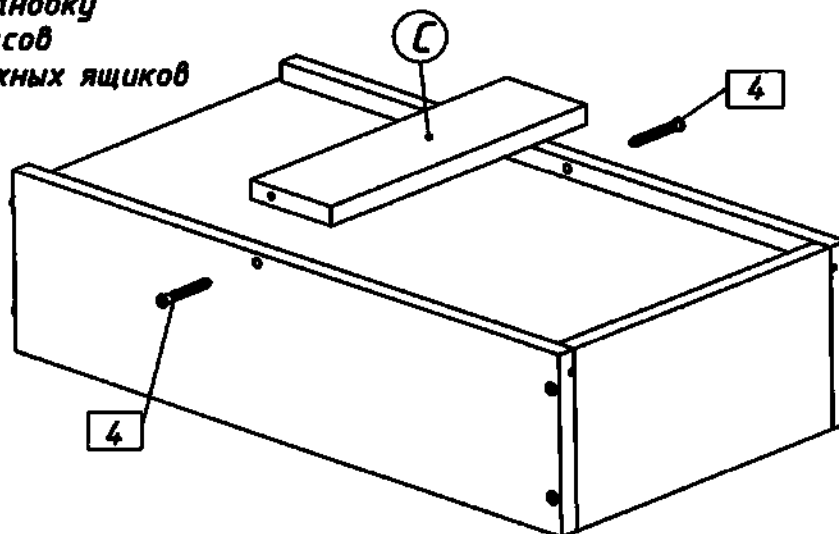


Сх1 шт.
4х2 шт.

х2

22 этап

Произведите сборку 2-х фасадов малых выдвижных ящиков

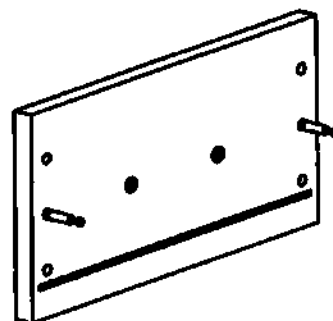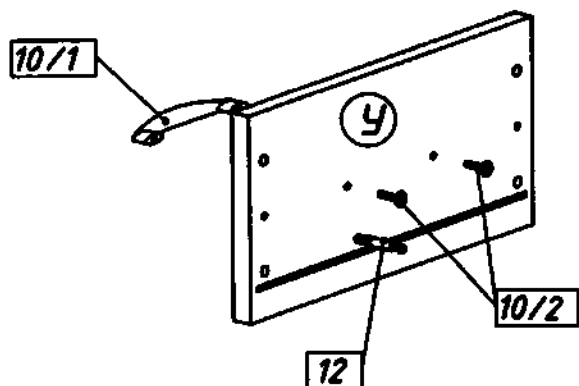

Ух1 шт.

10/1х1 шт.
10/2х2 шт.
12х2 шт.

х2

Ух1 шт.

14х2 шт.

x2

23 этап


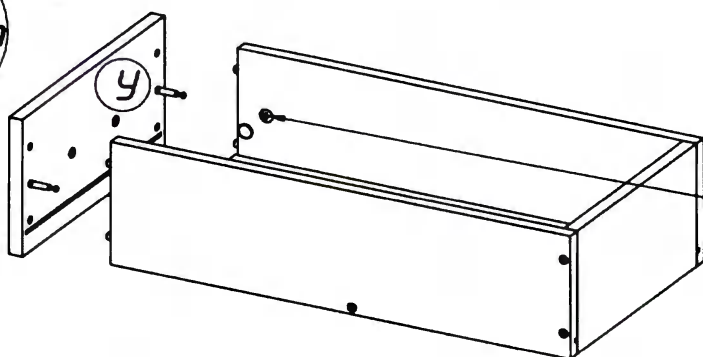


Схема фиксации фасада (У) и установки заглушек (14)

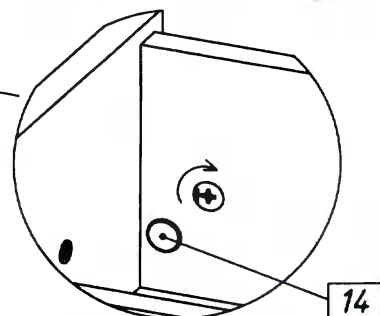

Соединив фасад (У) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (12) для его фиксации. Затем установите заглушки (14).


Произведите установку направляющих на 2 малых выдвижных ящиков

7х6 шт.

8/1х2 шт.

x2

24 этап

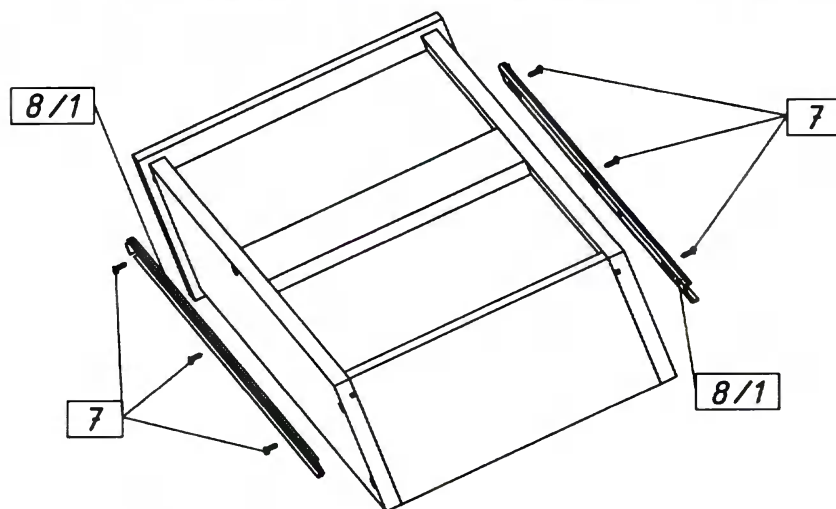

Произведите сборку деталей для каркаса левого ящика

Шх1 шт.


Пх1 шт.

Рх1 шт.

9х6 шт.

13х2 шт.

25 этап

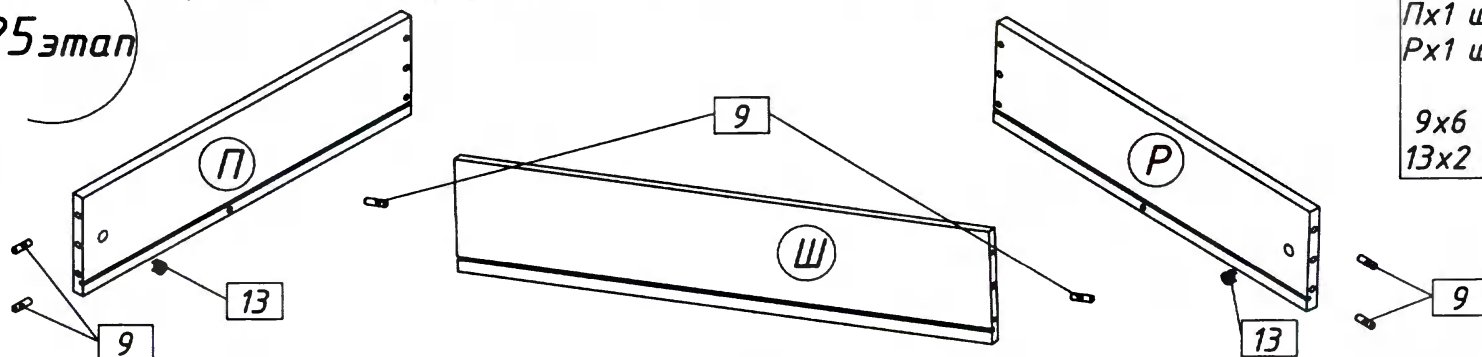

Произведите сборку деталей для каркаса нижнего ящика


Фх1 шт.

Хх1 шт.

Цх1 шт.



9х6 шт.

13х2 шт.

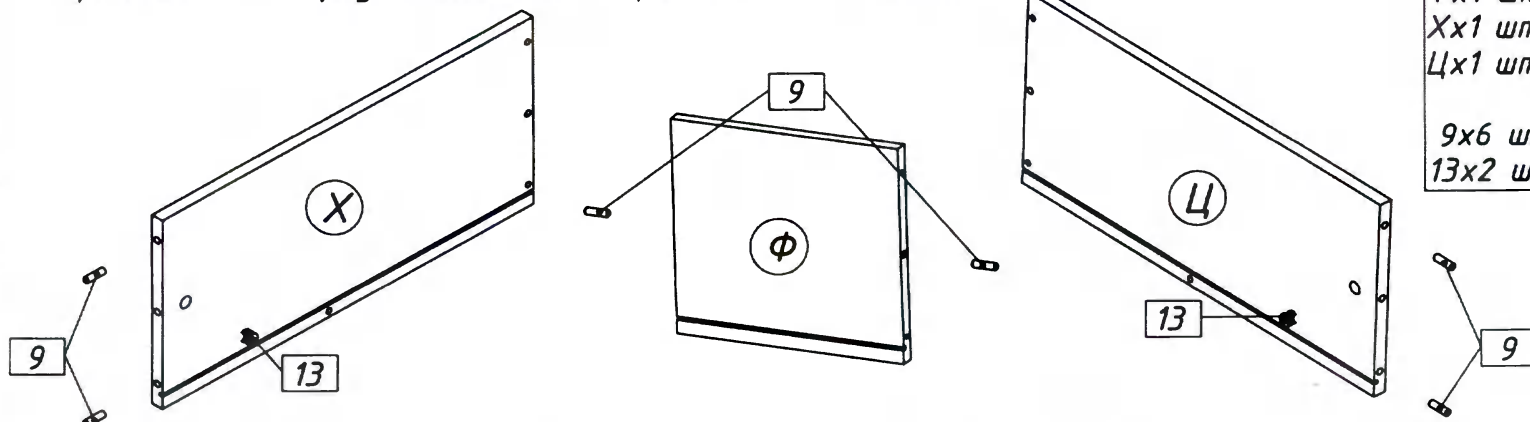


ОМ.29.777.03 Произведите сборку каркаса левого ящика.

26 этап

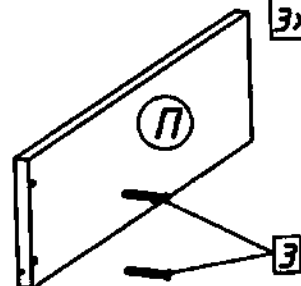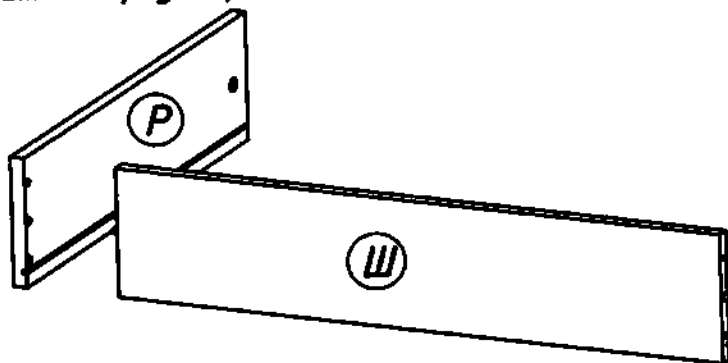

Шх1 шт.
Пх1 шт.
Рх1 шт.
Эх4 шт.


Произведите сборку каркаса нижнего ящика.

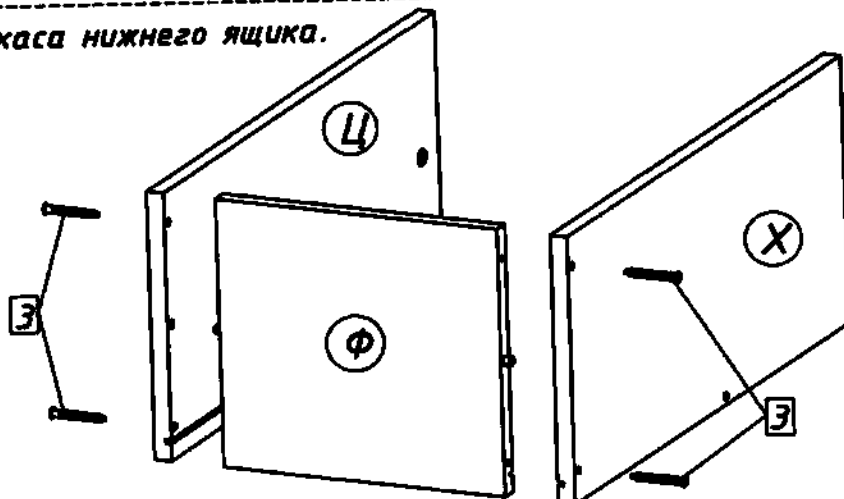

Фх1 шт.
Хх1 шт.
Цх1 шт.
Эх4 шт.


27 этап

Произведите установку дна для каркасов ящиков левого и нижнего

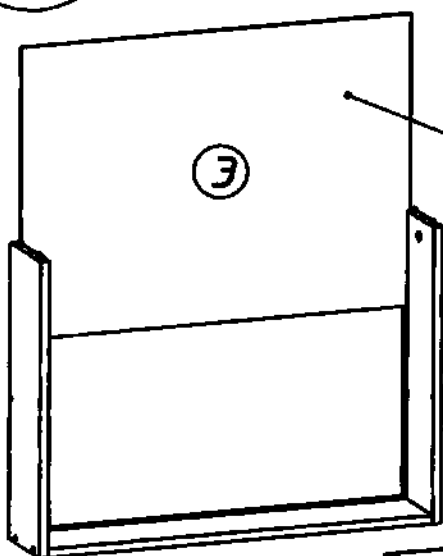


Окрашенная сторона

Окрашенная сторона

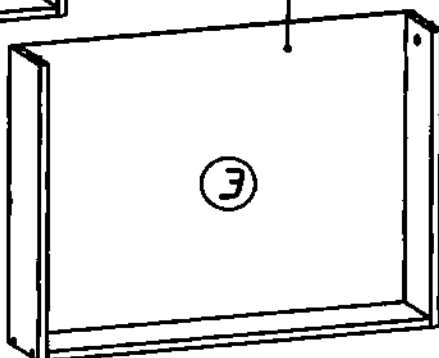


Тх1 шт.
Эх1 шт.

Окрашенная сторона

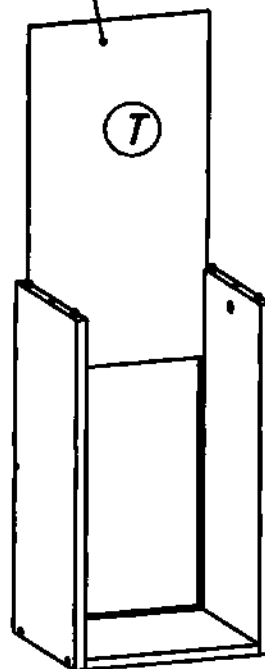


Окрашенная сторона

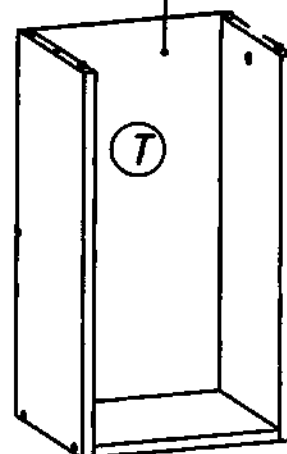

ОМ.29.777.03



28 этап

Произведите установку планки для каркасов
левого и нижнего ящиков

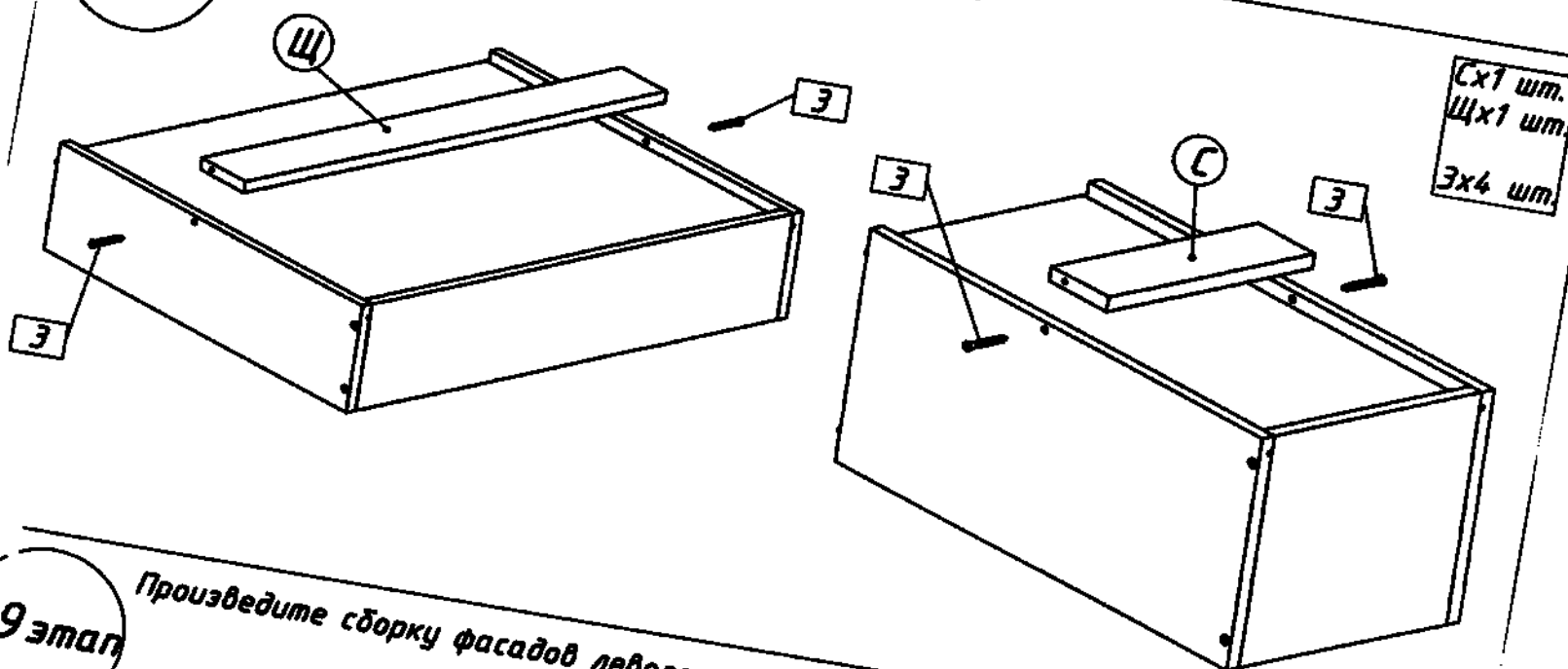

29 этап

Произведите сборку фасадов левого и нижнего ящиков

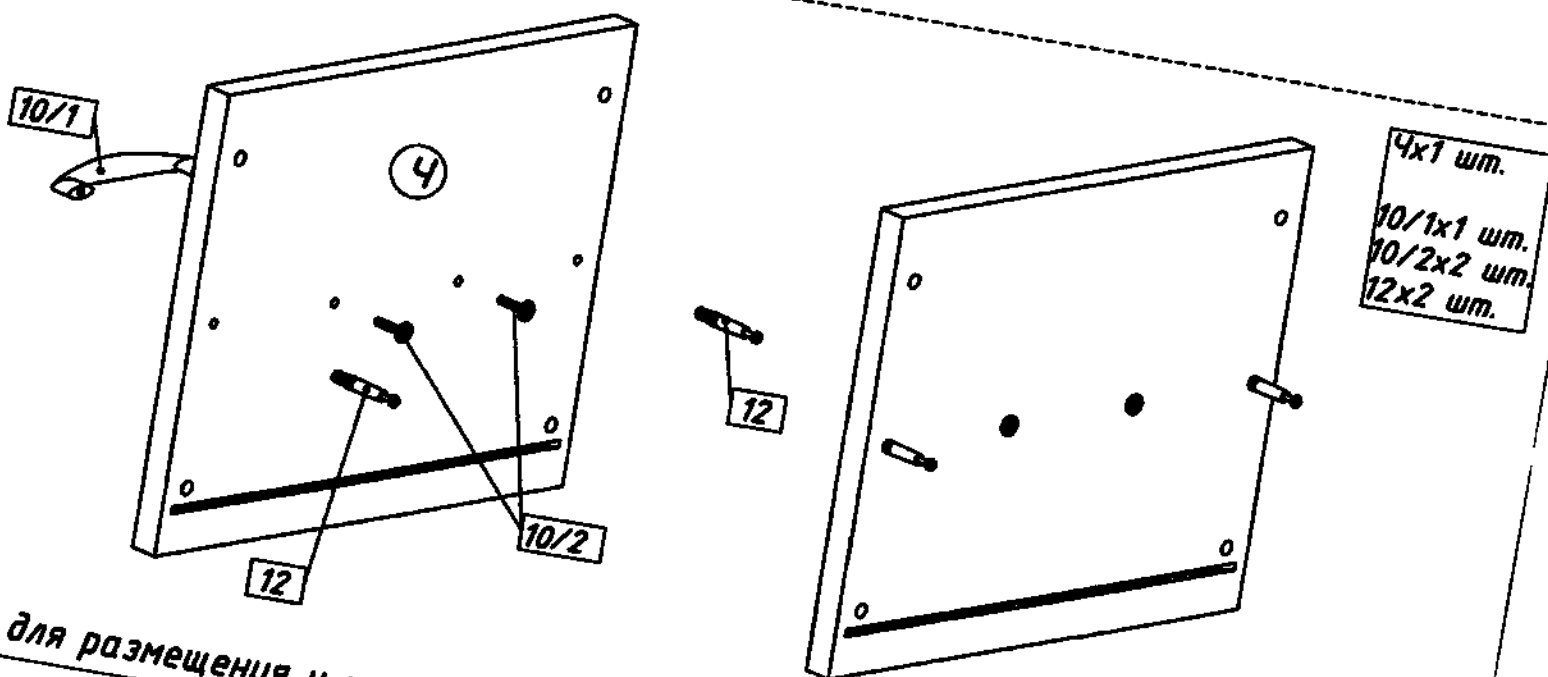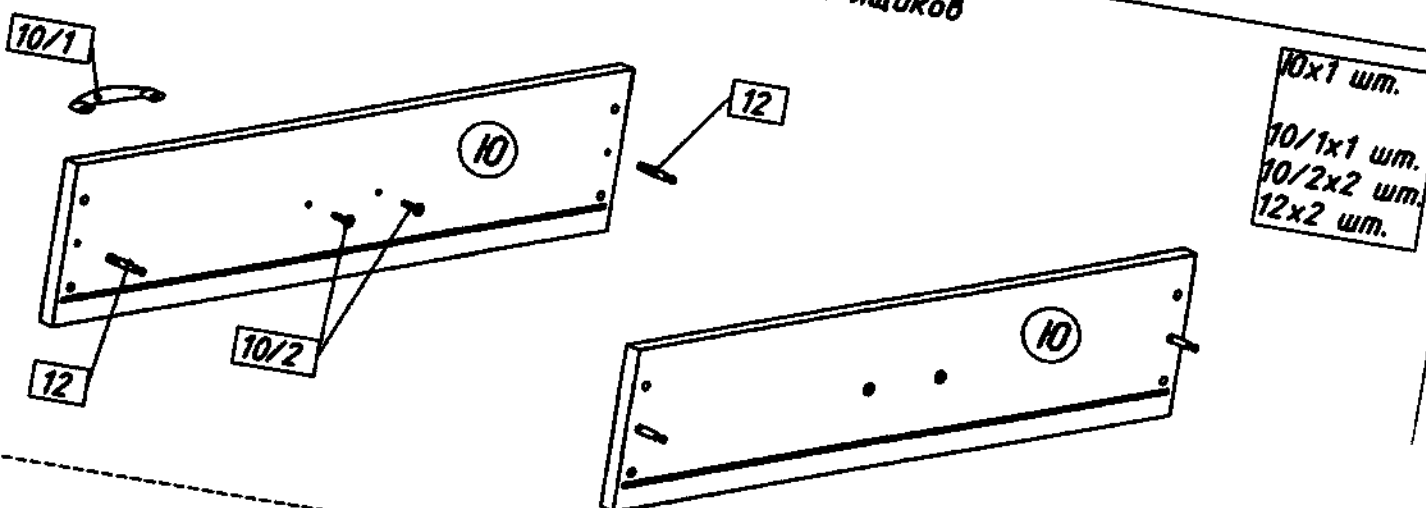

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.9)

30 этап



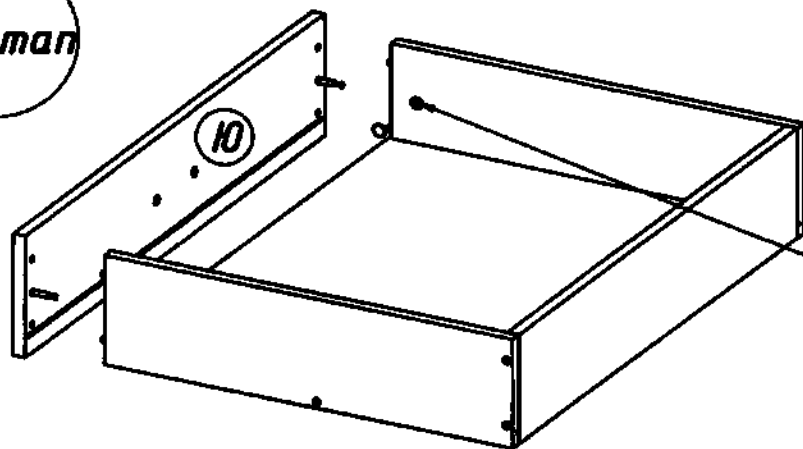


Схема фиксации
фасада (10) и
(4)
и установки
заглушек (14)

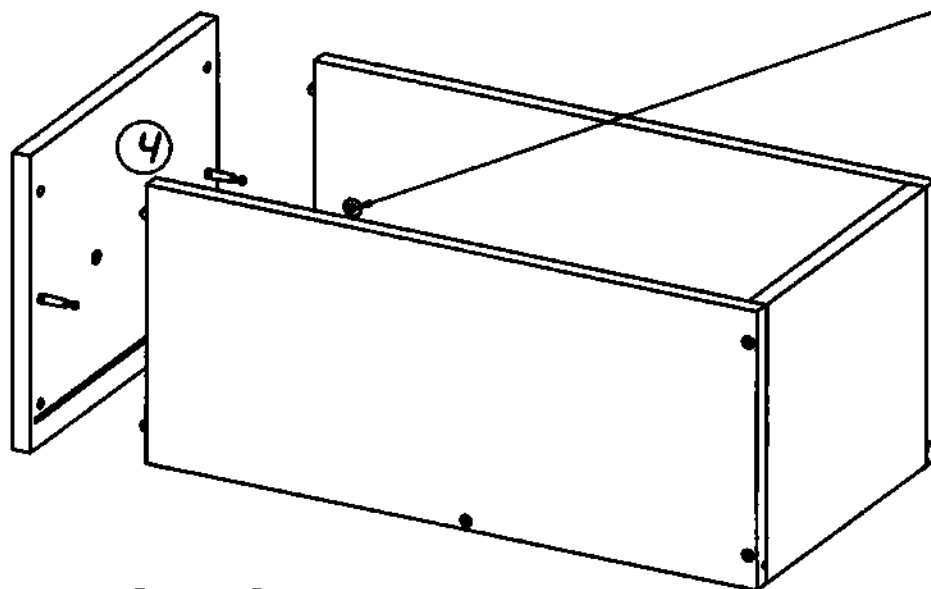
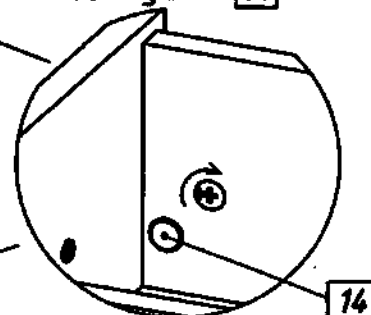


Соединив фасад (10) или (4) с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики (13) для его фиксации.

Затем установите заглушки (14).

31 этап


Произведите установку направляющих на ящик нижний

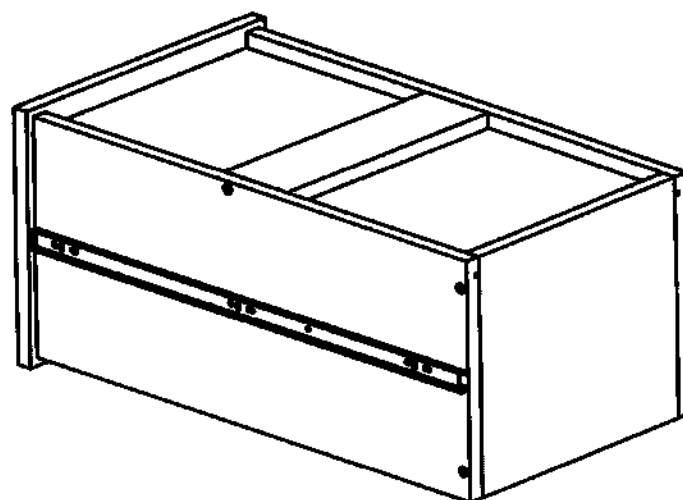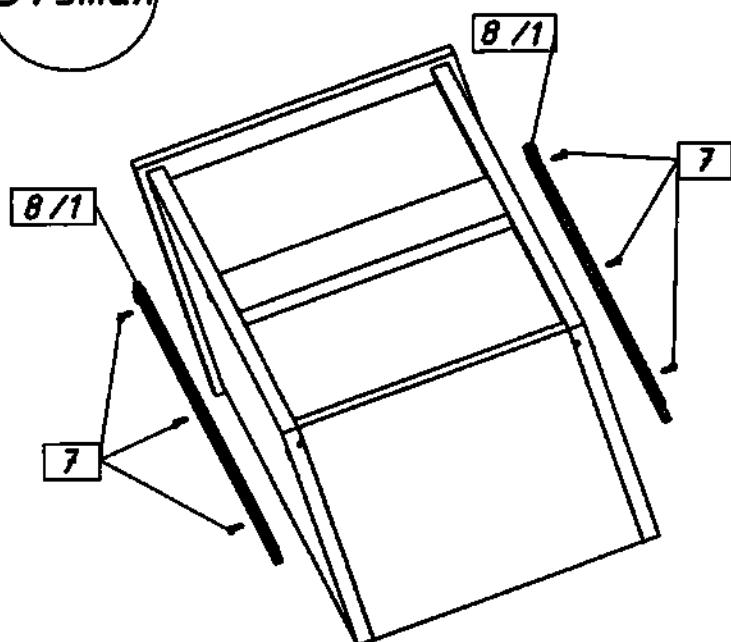

32 этап

Произведите установку направляющих на левый ящик


7x6 шт.
8/1x2 шт.

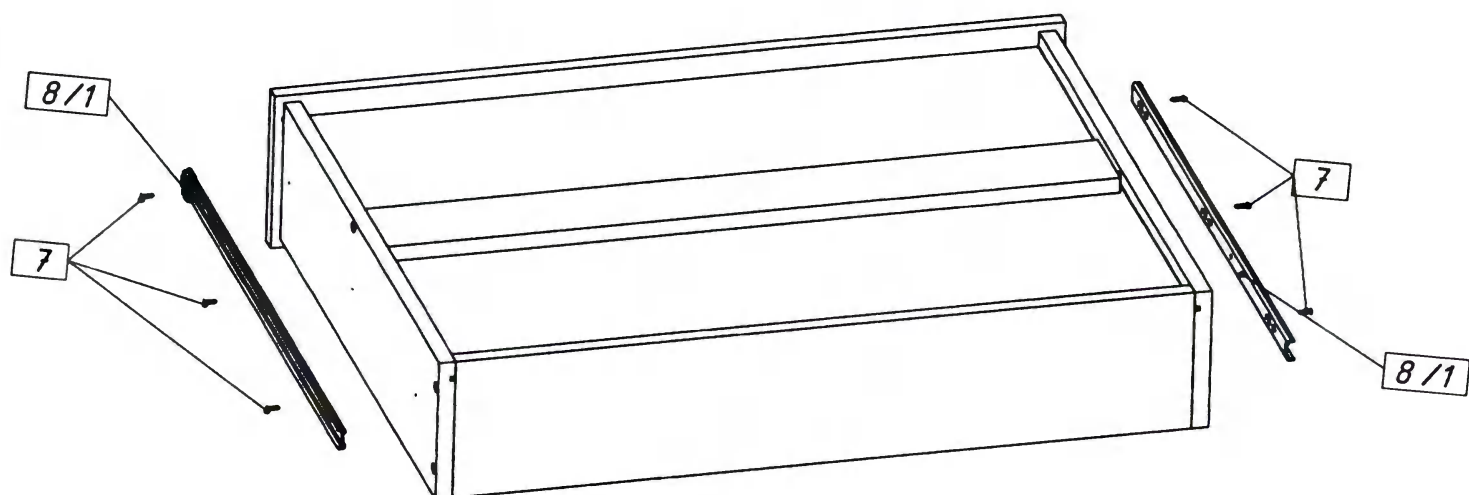

33 этап

Наклейте самоклеящийся логотип компании

15x1 шт.

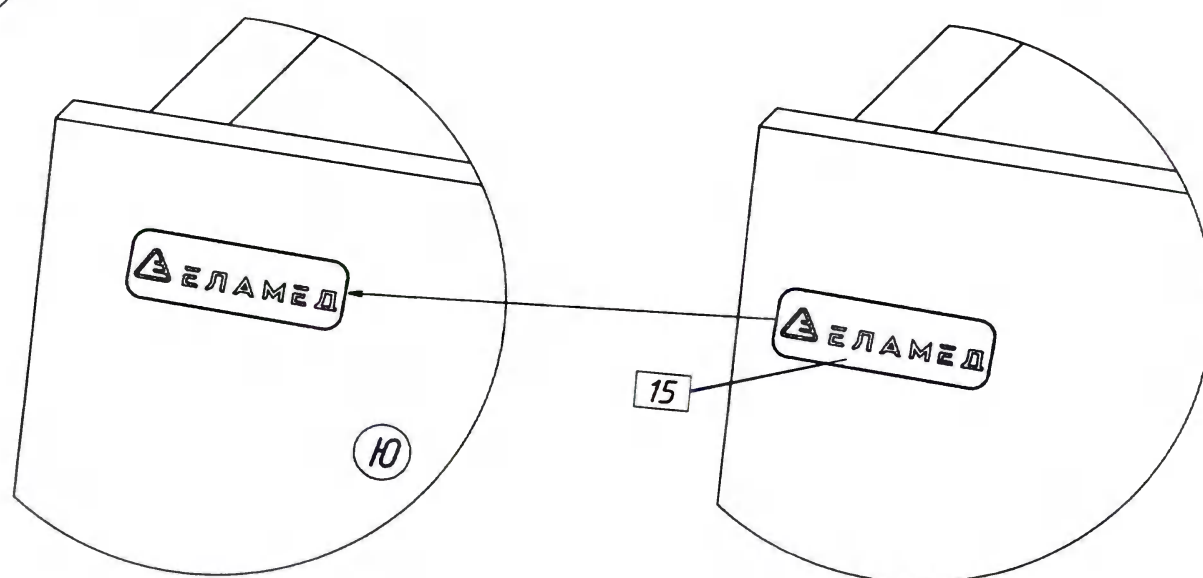


Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод.9)


ОМ.29.777.03


Произведите установку ящиков.

34 этап

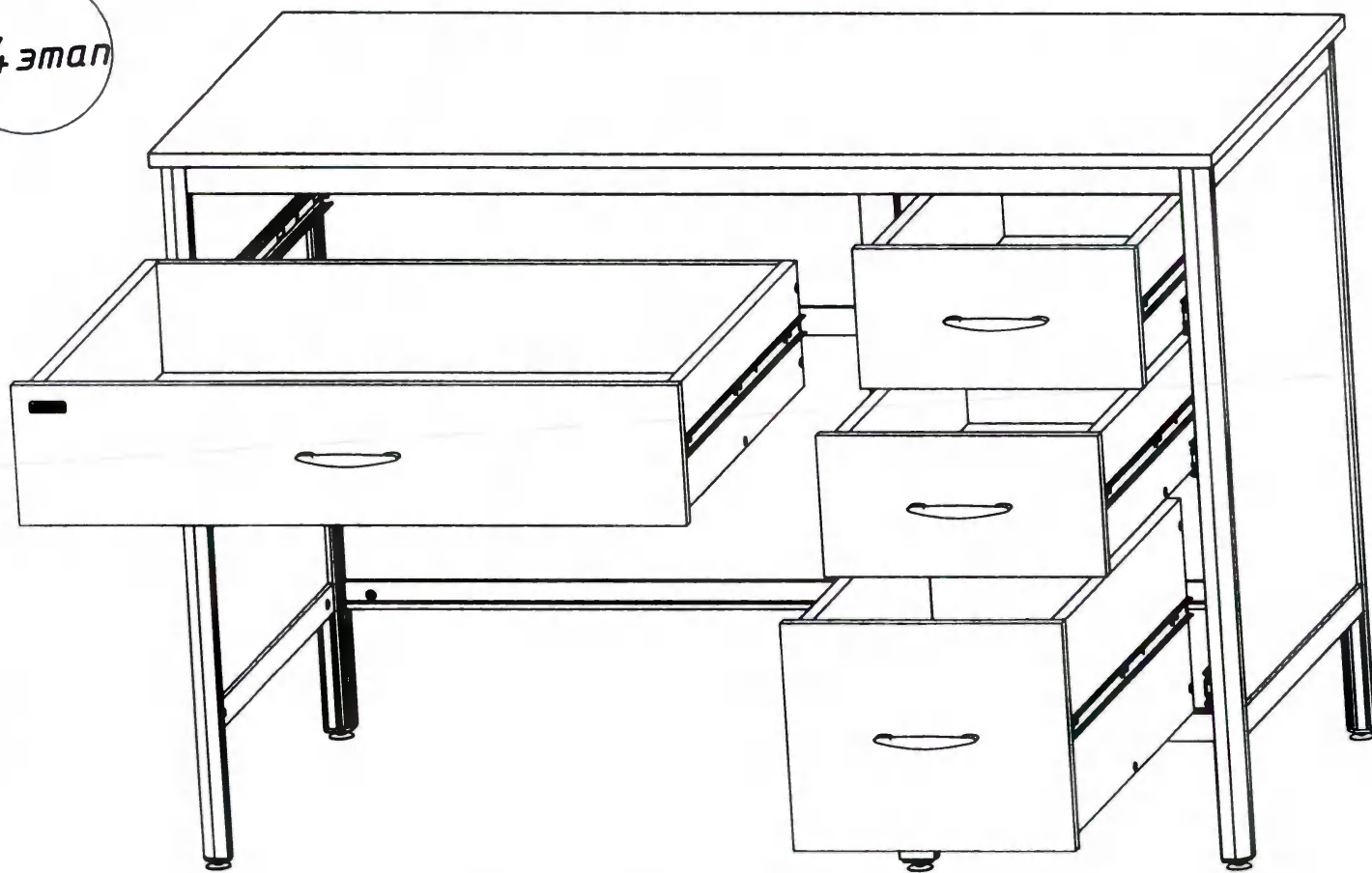

Сборка изделия завершена

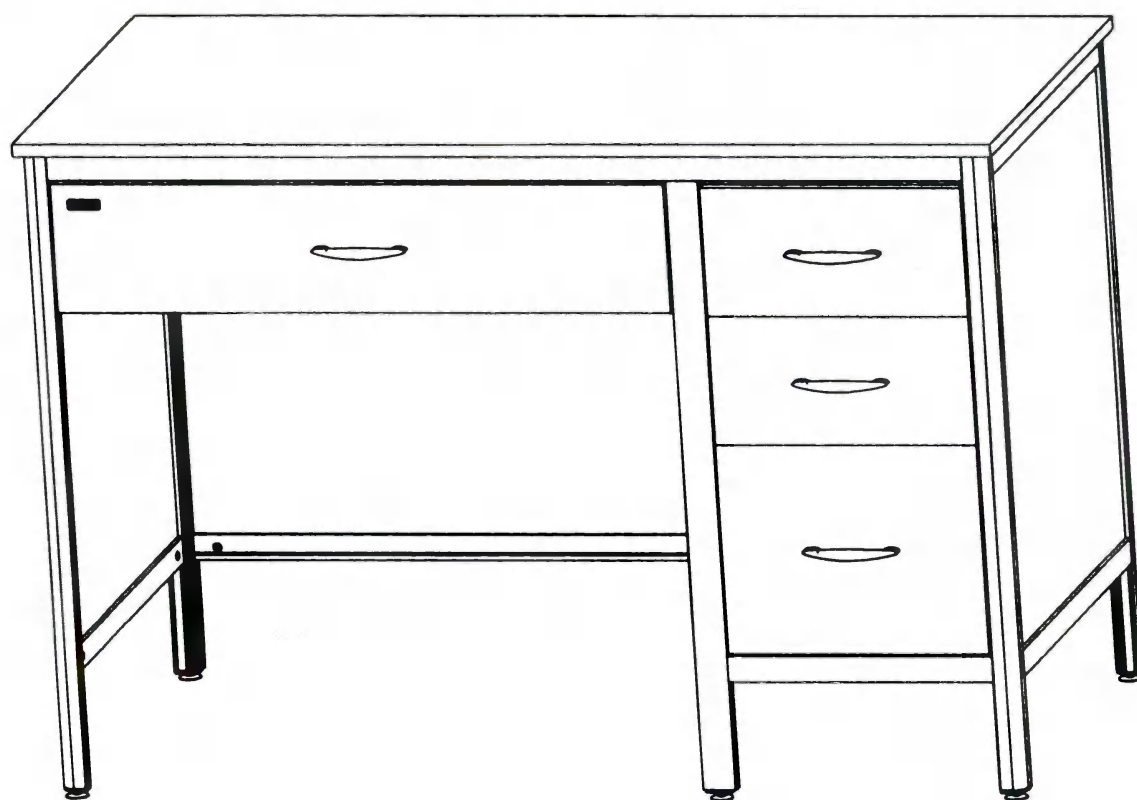

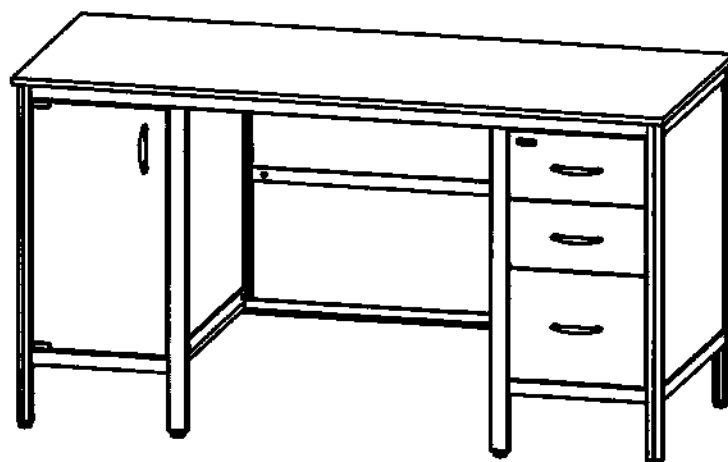

Условные обозначения:



1. А-М, ММ, Н-ГГ : детали
2. 1 - 20 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 30 : этапы сборки

Код товара: _____

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон нижний левый передний	1
Д	Прогон нижний задний	1
Е	Стойка передняя левая	1
Ж	Стойка задняя левая	1
З	Стенка задняя средняя	2
И	Стенка задняя	1
К	Прогон задний средний	1
Л	Прогон задний левый	1
М	Перегородка	1
ММ	Перегородка верхняя	
Н	Прогон верхний передний	1
О	Стенка задняя выдвижного ящика	1
П	Стенка левая выдвижного ящика	2
Р	Стенка правая выдвижного ящика	2
С	Планка выдвижного ящика	2
Т	Дно выдвижного ящика	3
У	Фасад выдвижного ящика	3
Ф	Дверь	1
Х	Заглушка прогона нижнего	1
Ц	Заглушка прогона верхнего	1
Ч	Полка верхняя	1
Ш	Полка нижняя	1
Щ	Прогон задний правый	1
Э	Стойка передняя правая	1
Ю	Стойка задняя правая	1
Я	Прогон нижний правый передний	1
АА	Стенка задняя выдвижного ящика	1
ББ	Стенка левая выдвижного ящика	1
ВВ	Стенка правая выдвижного ящика	1
ГГ	Фасад выдвижного ящика	1

Крепёж и фурнитура

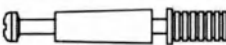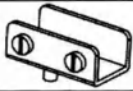Арт.	Кол - во	Обозначение	
1	4	Уголок мебельный	
2	4	Евровинт 6,3х13	
3	18	Конфирмат	
4	6	Опора	
5	4	Полкодержатель	
6	8	Саморез 3х20	
7	6	Площадка под направляющие	
8	34	Саморез 3х12	
9	3 комплекта	Направляющие	9/1  9/2 
10	18	Шкант мебельный	
11	4 комплекта	Ручка мебельная	11/1  11/2 
12	-	Заглушка декоративная	
13	6	Шток эксцентрика	
14	6	Эксцентрик	
15	6	Заглушка эксцентрика	
16	1	Защёлка магнитная	16/1  16/2 
17	1	Площадка магнита	
18	1 комплект	Петля для дверей из ЛДСП	
19	1	Логотип компании	
20*	1	Ключ шестигранный	



Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

* Конфирматы [3] закручивать ключом шестигранным [20] заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

(1) 3man

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

12x1 шм.

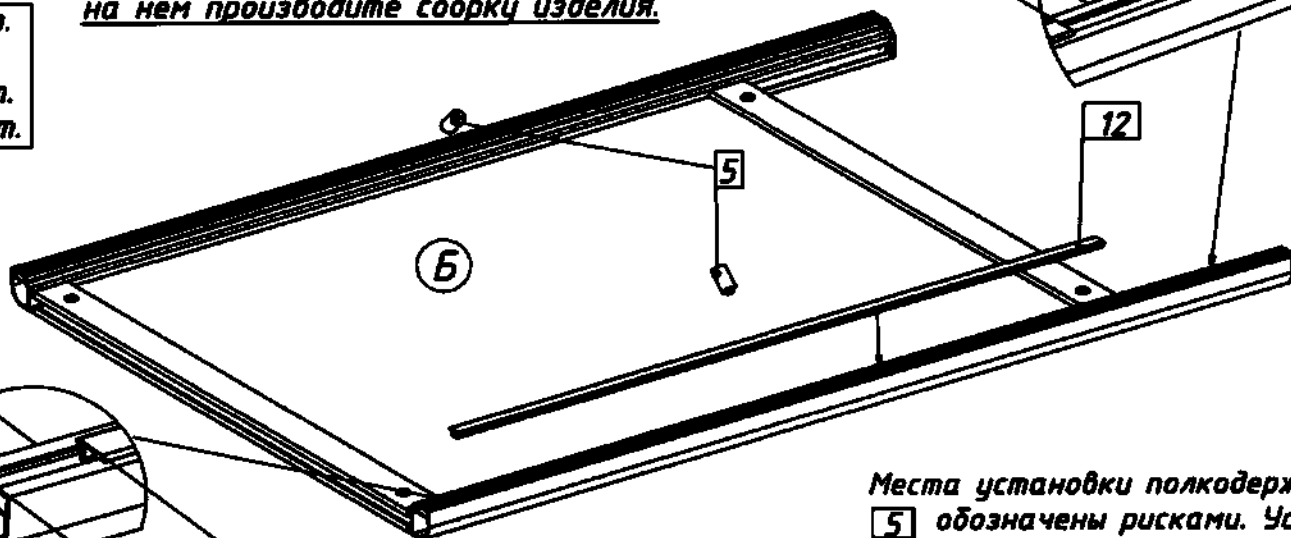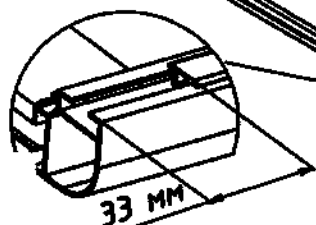

Места установки полкодержателей **5** обозначены рисками. Установив полкодержатели **5**, затяните их до ощутимого сопротивления ключом **20**

(2 этап)

Произведите сборку стенки правой


Bx1 μm .

6x3 шм.

7x3 шм.

8x6 шм.

9/2x3 шм.
12x1 шм.

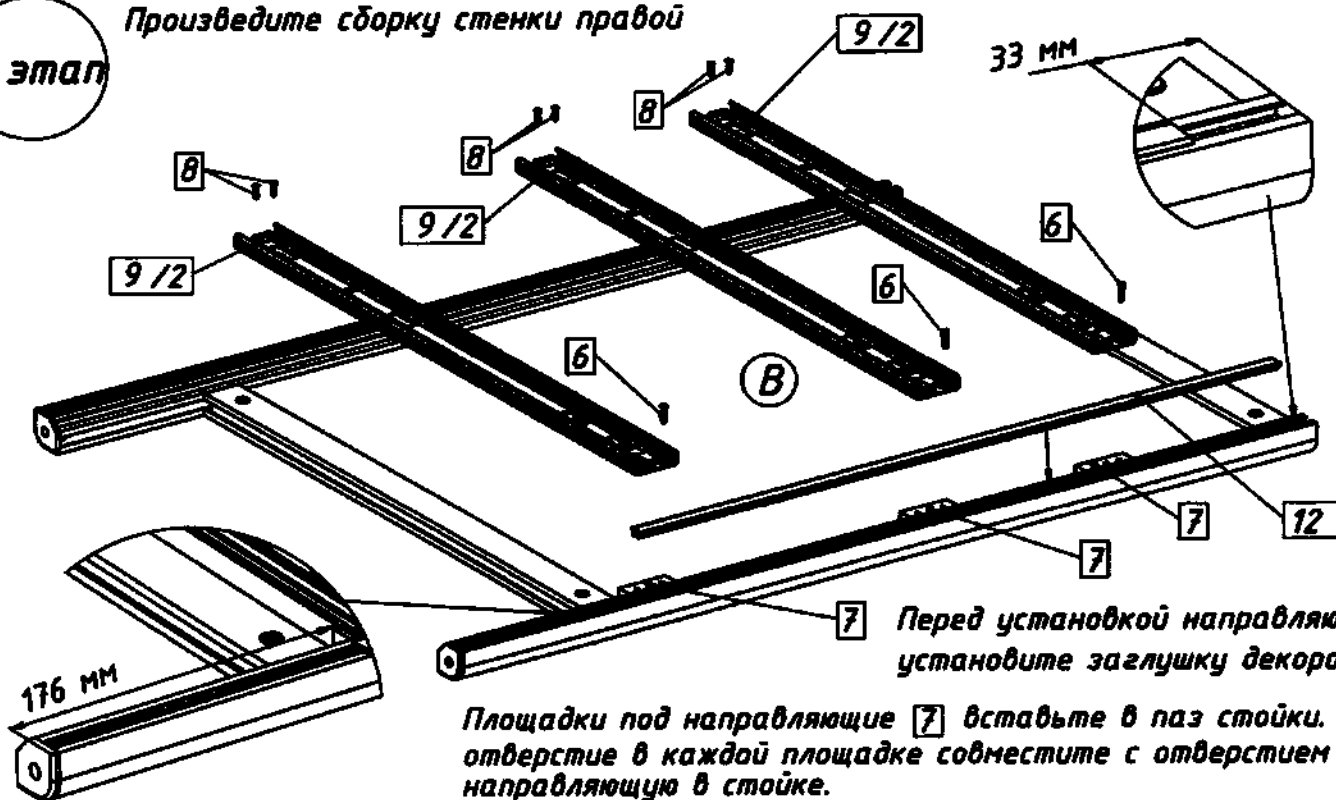

**Перед установкой направляющих 9/2
установите заглушку декоративную 12**


Площадки под направляющие [7] вставьте в паз стойки. Верхнее отверстие в каждой площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.

(3) **Этапы**

Произведите сборку стойки задней левой (Ж)

Xx1 шм.

5x1 шт.

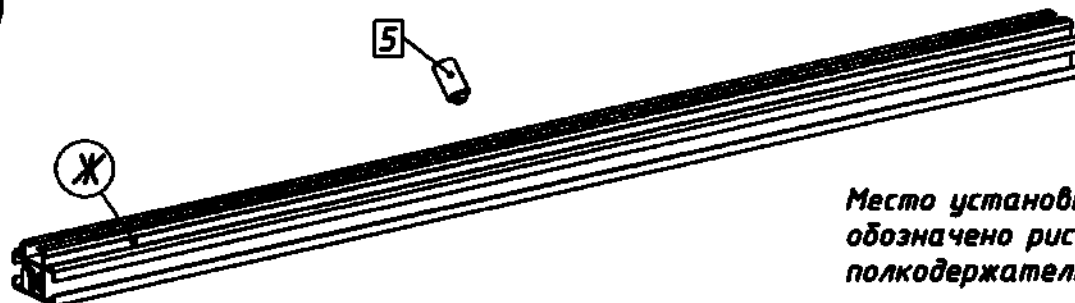


Место установки полкодержателя **5** обозначено рисками. Установив полкодержатель **5**, затяните его до ощутимого сопротивления ключом **20**

Произведите сборку стойки передней левой (Е), стойки передней правой (Э)

4 этап

Схема установки
заглушек 12
в стойку

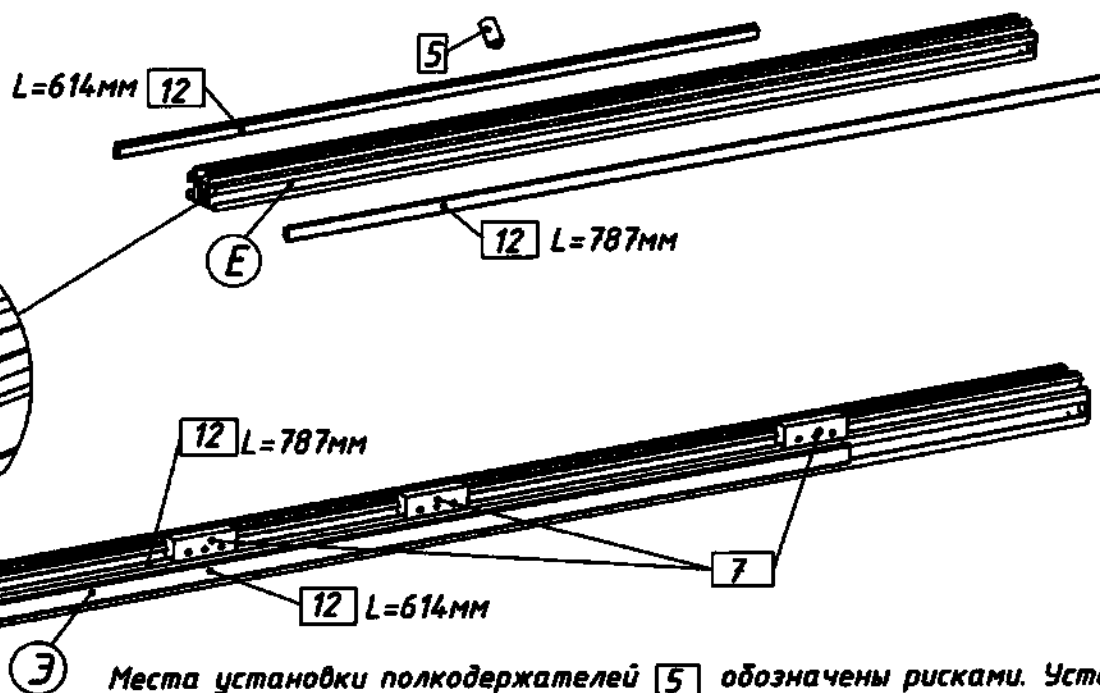


Ех1 шт.
Хх1 шт.
Зх1 шт.
5х1 шт.
7х3 шт.
12х4 шт.

Места установки полкодержателей 5 обозначены рисками. Установив полкодержатели 5, затяните его до ощутимого сопротивления ключом 20. Площадки под направляющие 7 вставьте в паз стойки. Верхнее отверстие в каждой площадке совместите с отверстием под направляющую в стойке.


5 этап

Произведите сборку прогона переднего нижнего левого (Г) и переднего нижнего правого (Я)

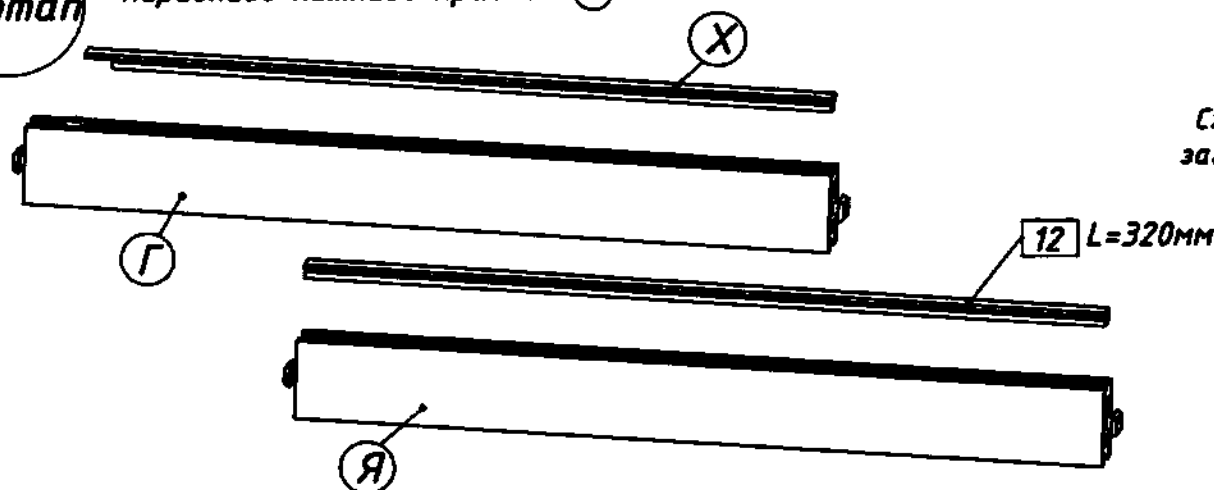

Гх1 шт.
Хх1 шт.
12х1 шт.


Схема установки
заглушек X и 12

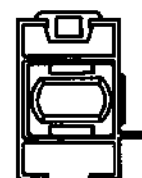

6 этап

Произведите сборку прогона переднего верхнего (Н)

Схема установки
заглушек
12 и Ц

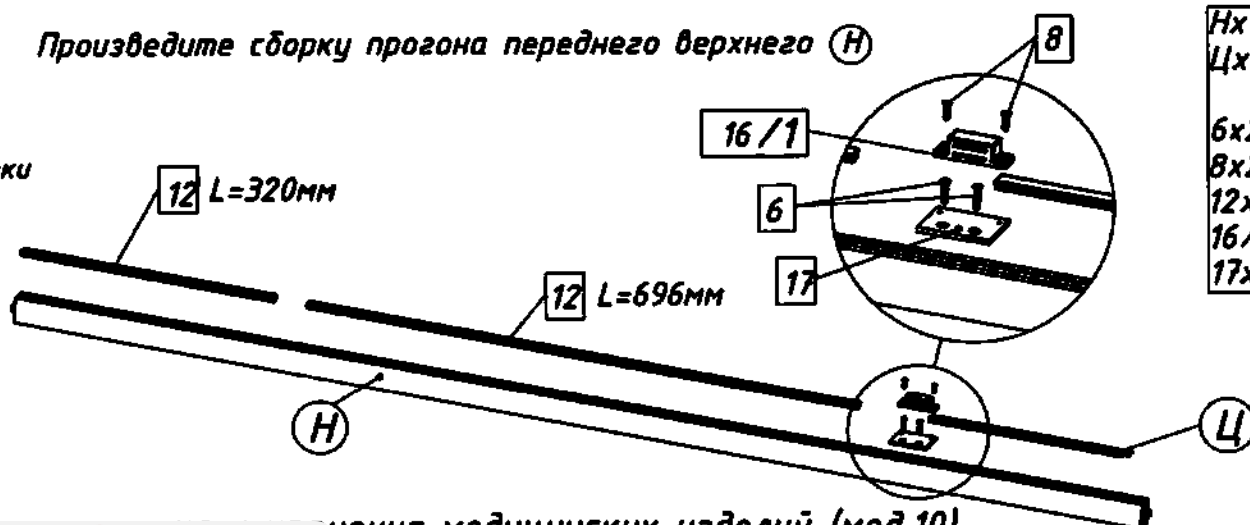


Нх1 шт.
Цх1 шт.
6х2 шт.
8х2 шт.
12х2 шт.
16/1х1 шт.
17х1 шт.

7 этап

Ослабьте замки в прогоне нижнем заднем (Д) с помощью ключа 20. Вставьте прогоны в стенки (Б) и (В). После этого поверните прогоны на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков прогонов находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.


Бх1 шт.
Вх1 шт.
Дх1 шт.

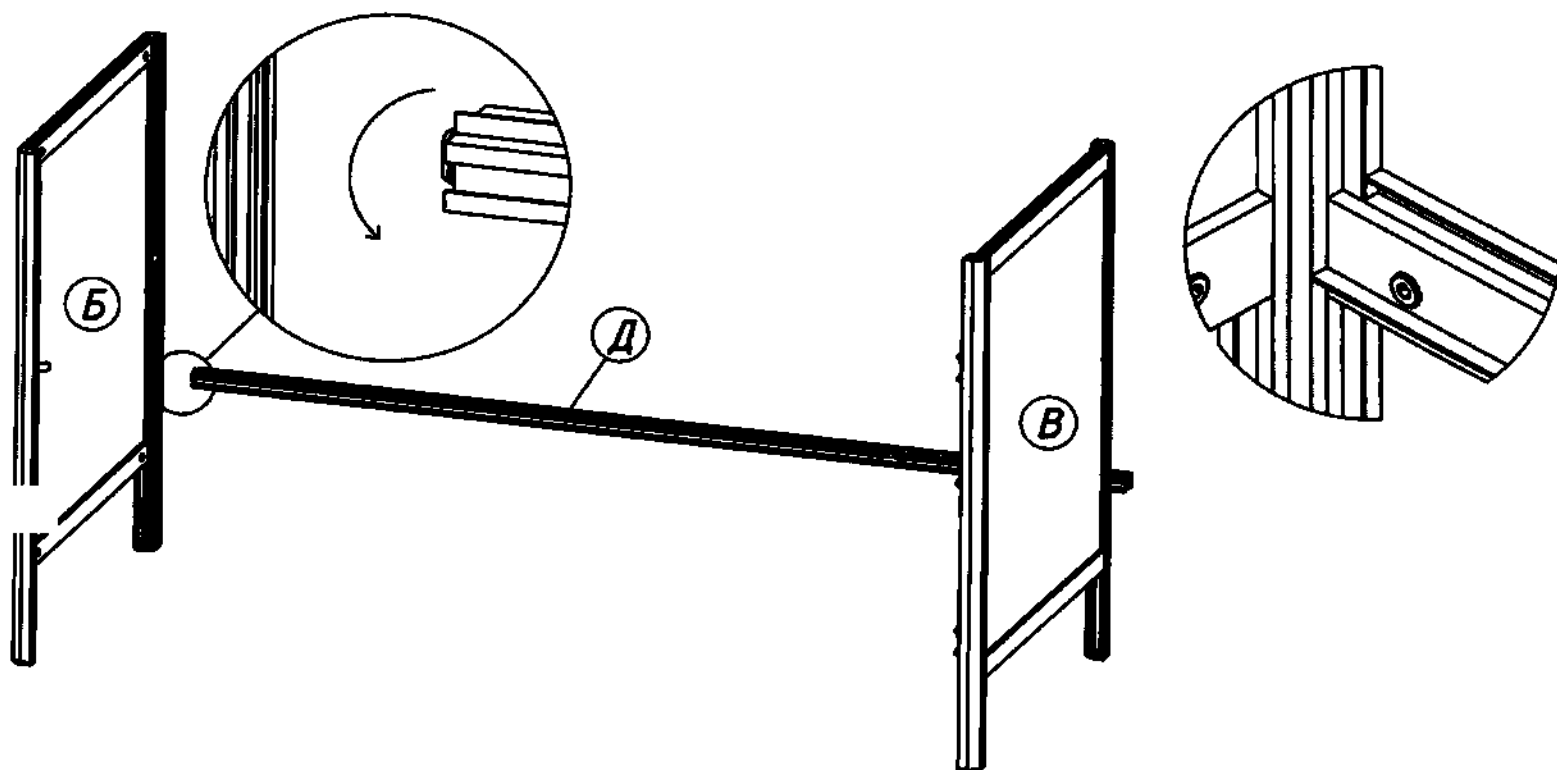

8 этап

Ослабьте замок в стойке задней левой (Ж) и стойке задней правой (Ю) с помощью ключа 20. Вставьте стойку в прогон (Д) и после этого поверните стойки на 90 градусов таким образом, чтобы винт замка стойки находился с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винт замка стойки, но не до полной фиксации, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стоек (Ж) и (Ю) при установке стенок задних.



Жх1 шт.
Юх1 шт.

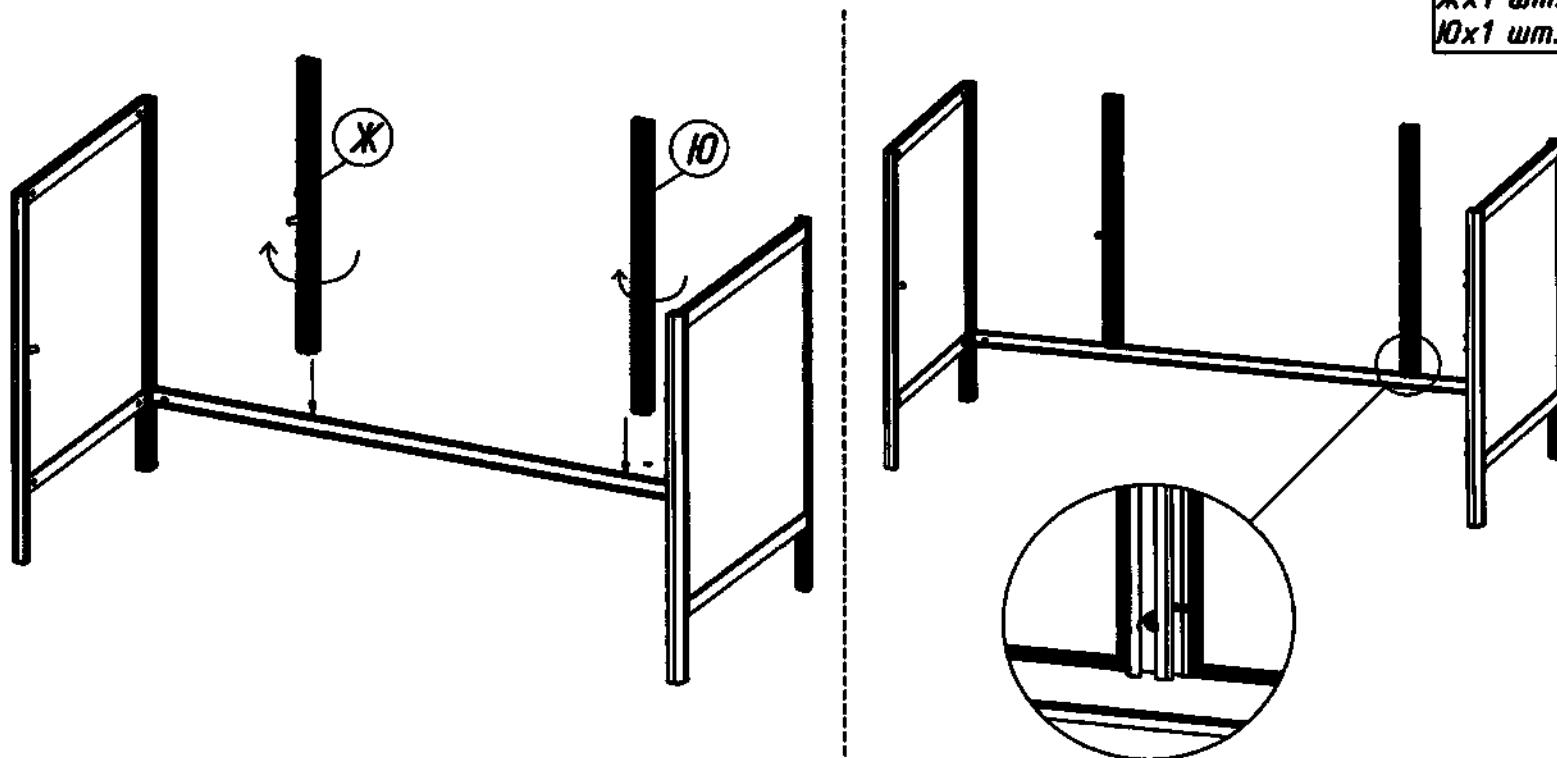

Произведите установку прогона верхнего переднего (Н) таким образом, чтобы винты замков прогона (Н) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона (Н), тем самым зафиксировав его на стенках.



Нх1 шт.

9 этап

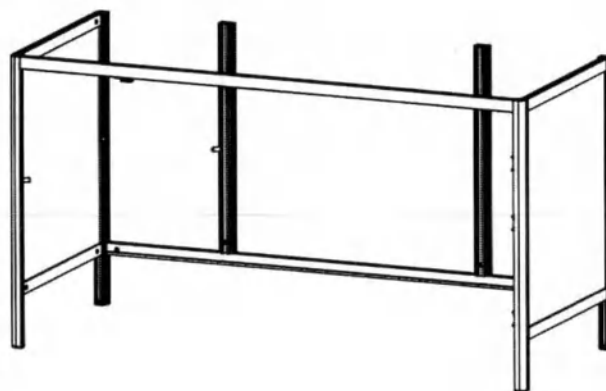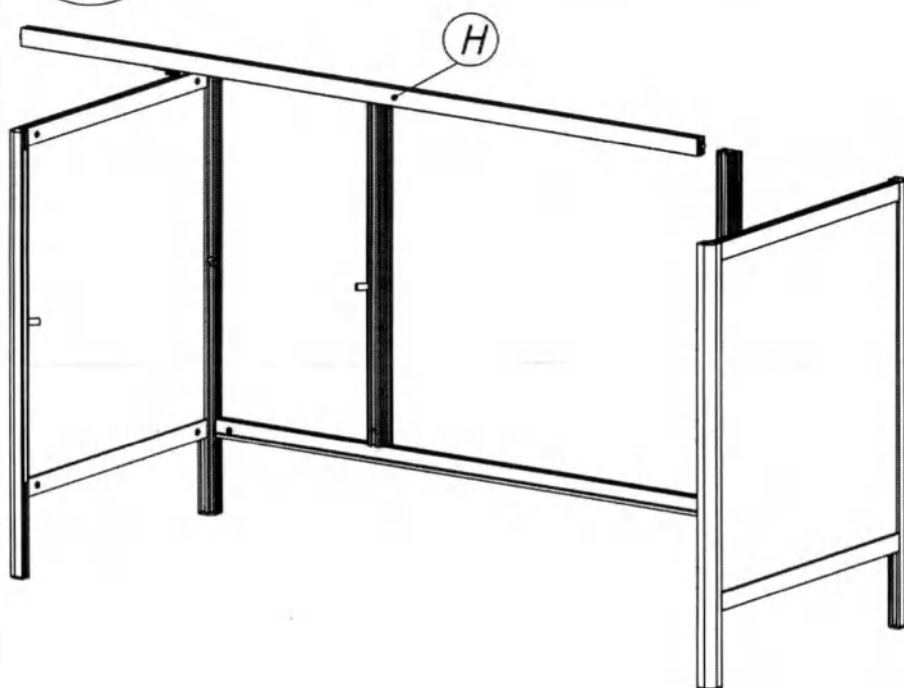


10 этап

Ослабьте замки в стойке передней левой (Е) и стойке передней правой (Э) с помощью ключа [20]. Вставьте стойку по центру прогона (Н). После этого поверните стойку на 90 градусов таким образом, чтобы винты замков стоек находились с внутренней стороны конструкции. Далее слегка затяните винты замков стоек, но не до полной фиксации стоек на прогонах, так как в дальнейшем будет необходима регулировка положения стоек.

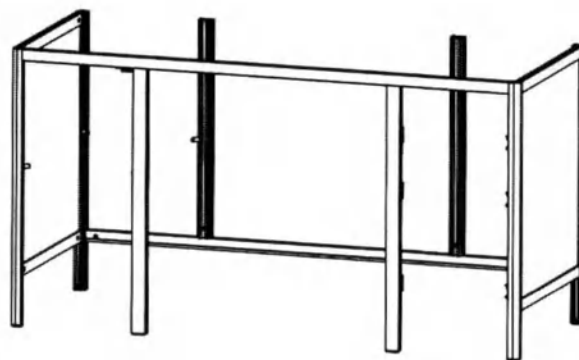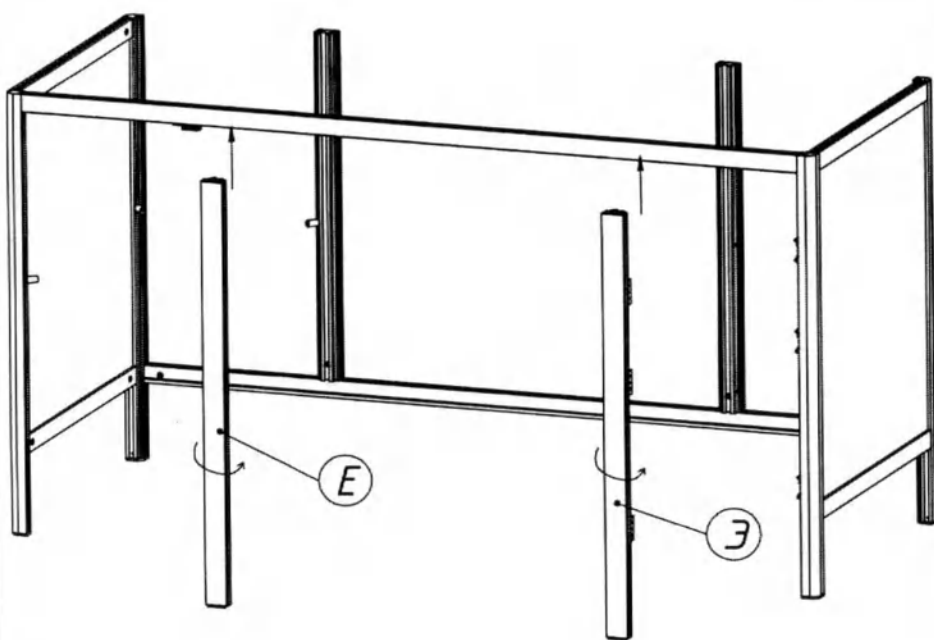
Ех1 шт.
Эх1 шт.

11 этап


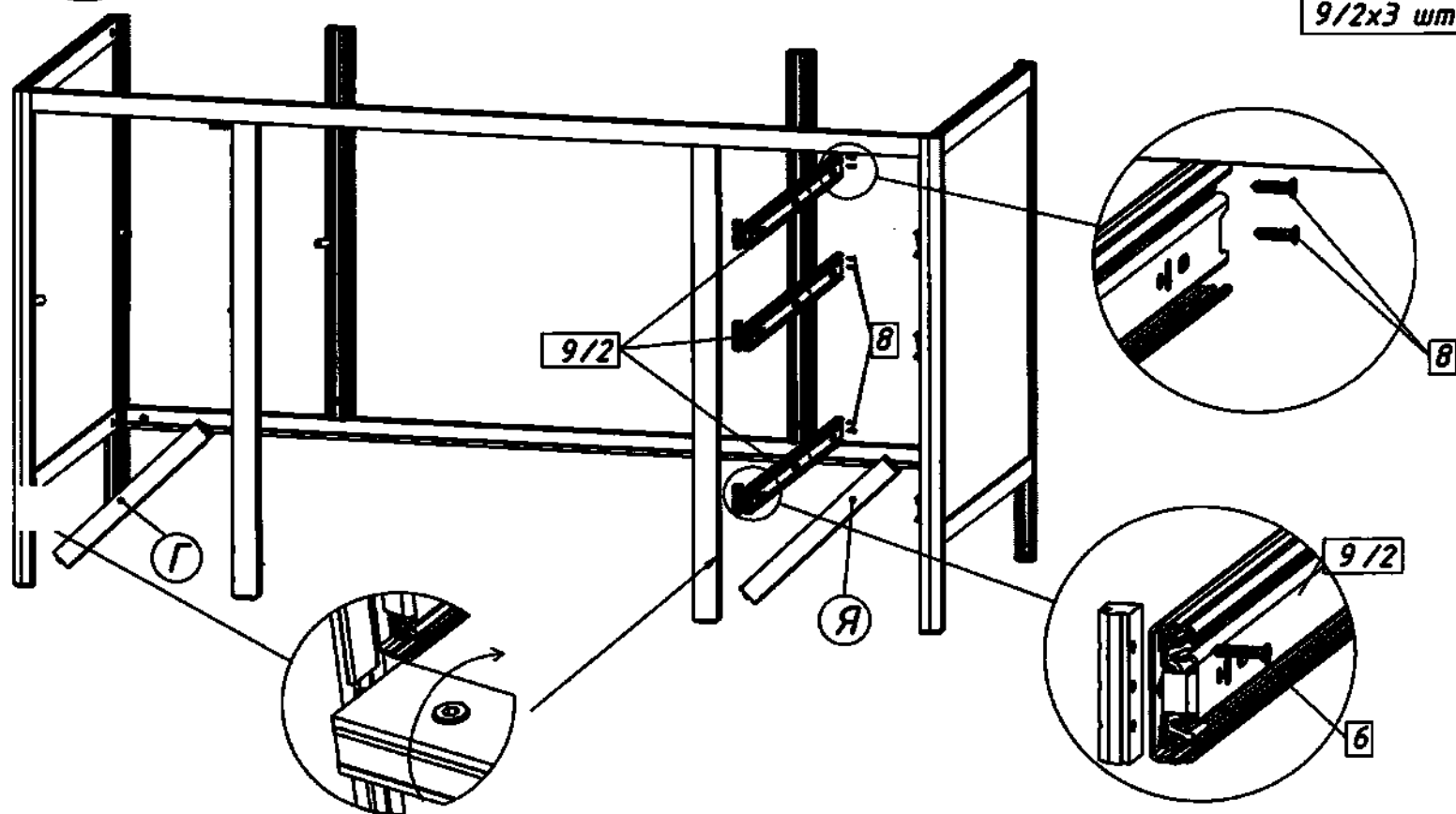
Гх1 шт.
Ях1 шт.6х3 шт.
8х6 шт.
9/2х3 шт.

12 этап

Произведите установку стенки задней средней (З) и прогона заднего левого (К). Далее затяните винты замков прогона.

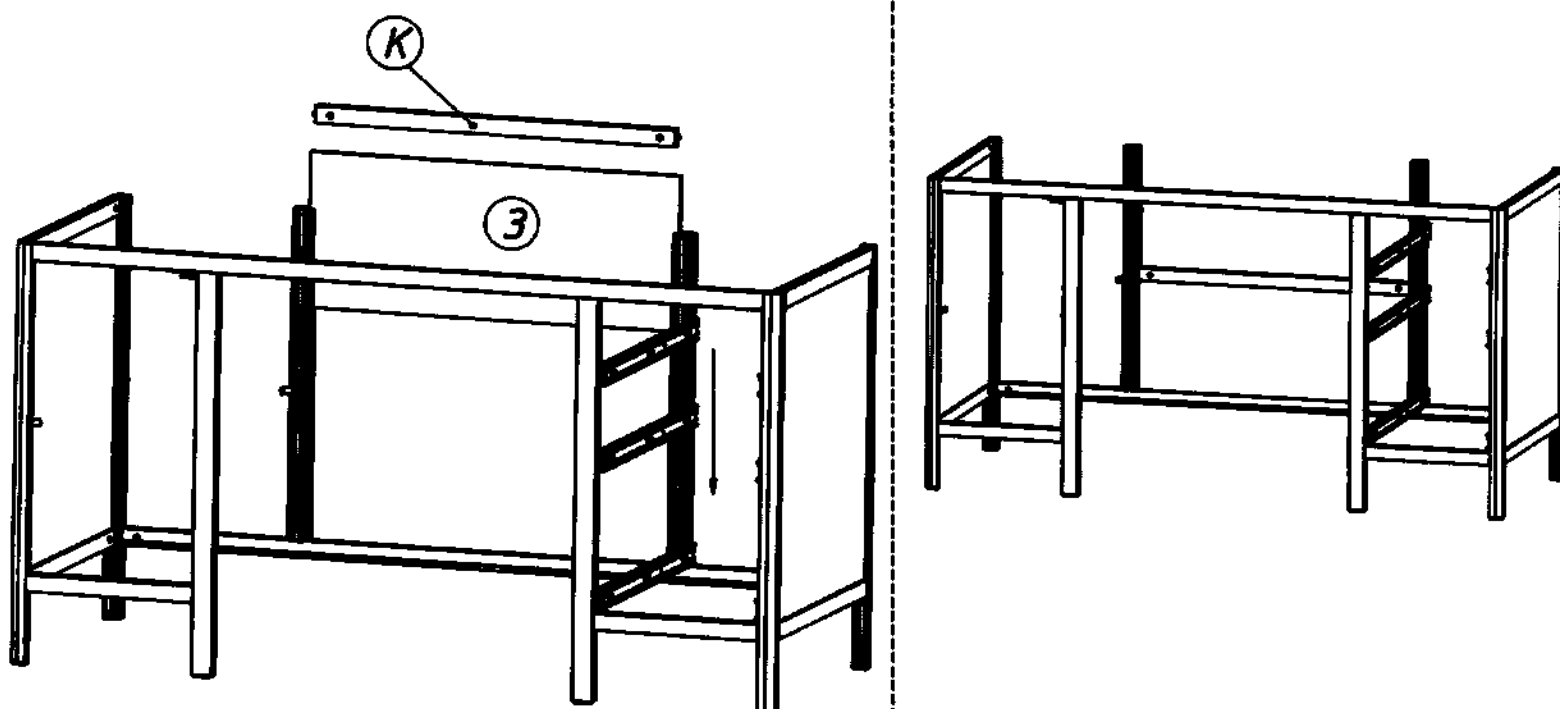Зх1 шт.
Кх1 шт.

13 этап

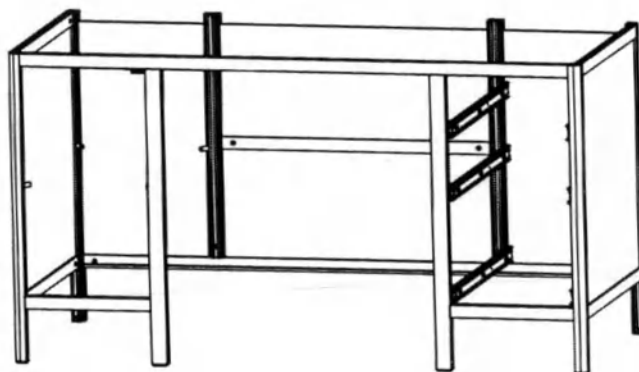
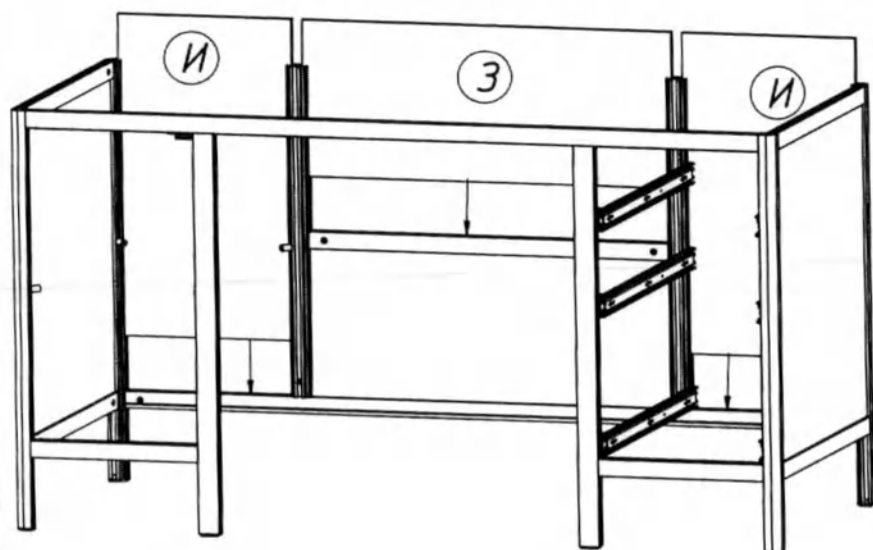


ВНИМАНИЕ: после данного этапа сборки необходимо затянуть винты замков стоек задних левой (Ж) и правой (Ю), а также стоек передних левой (Е) и правой (Э), тем самым окончательно зафиксировав их.

14 этап



Произведите установку прогон задних левого (Л), среднего (К) и правого (Щ) таким образом, чтобы винты замков прогонов (Л, К и Щ) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогонов, тем самым зафиксировав их на стенках.

Лx1 шт.
Кx1 шт.
Щx1 шт.

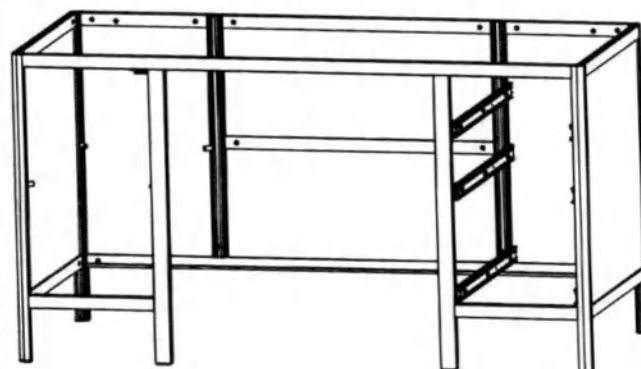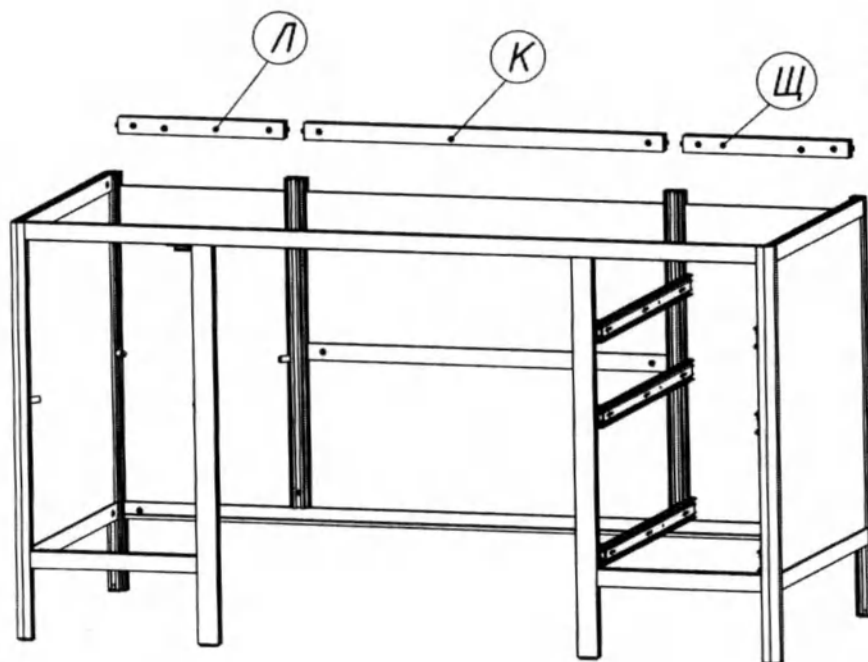

15 этап

Мх1 шт.
ММх1 шт.

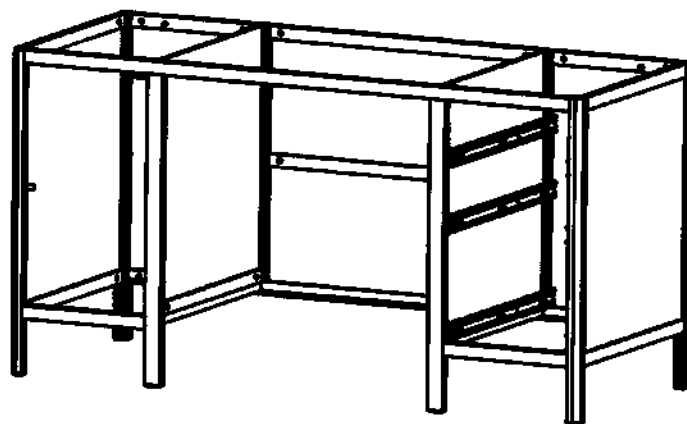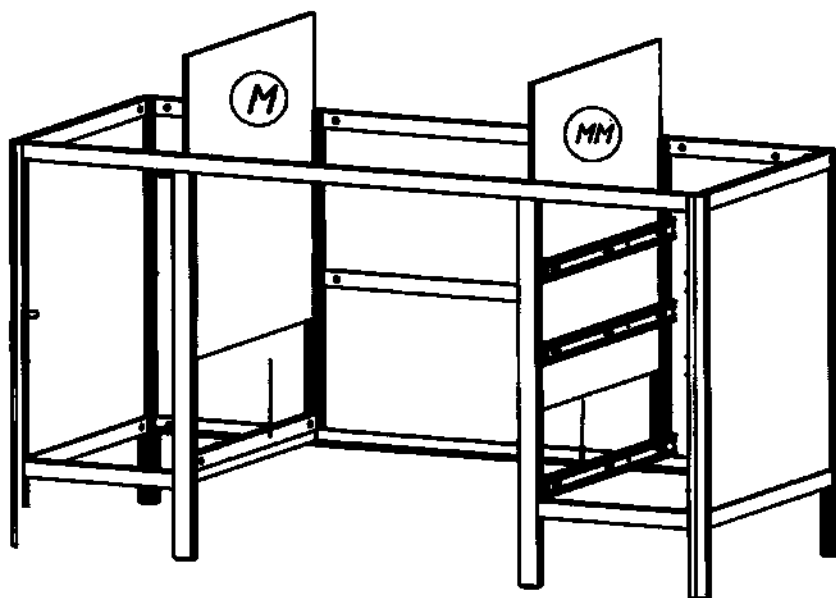


16 этап

Произведите сборку столешницы

Ах1 шт.

2х4 шт.



1х4 шт.

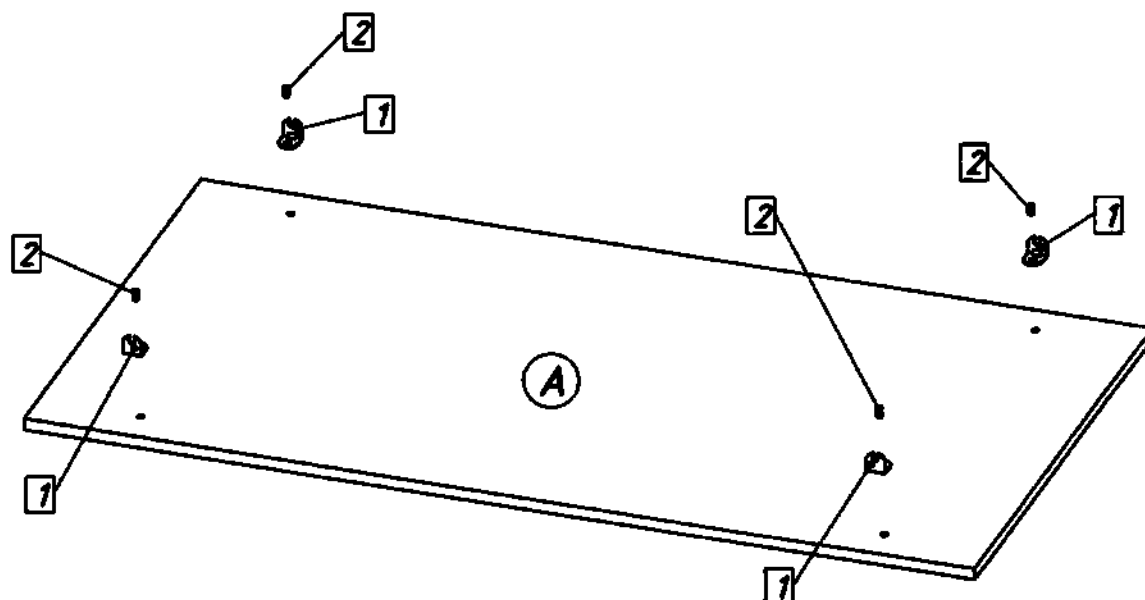

17 этап

Произведите установку ранее собранного каркаса тумбочки на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

Ах1 шт.

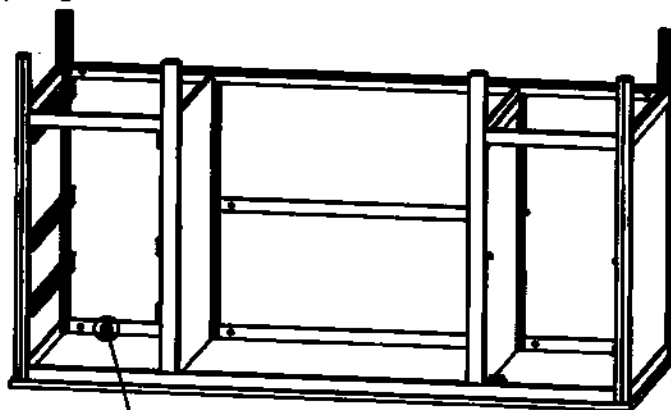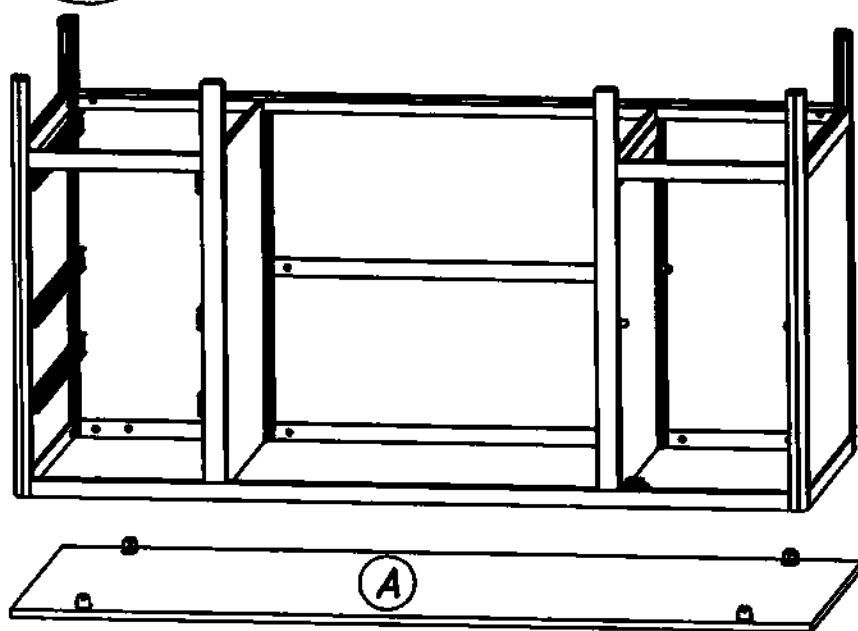


Затяните четыре винта в уголках для фиксации столешницы.

18 этап

Произведите установку опор, вкручивая их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

4х6 шт.
12х10 шт.


Опоры 4 следует закручивать рожковым ключом по часовой стрелке, либо плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ:
Рожковый ключ плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

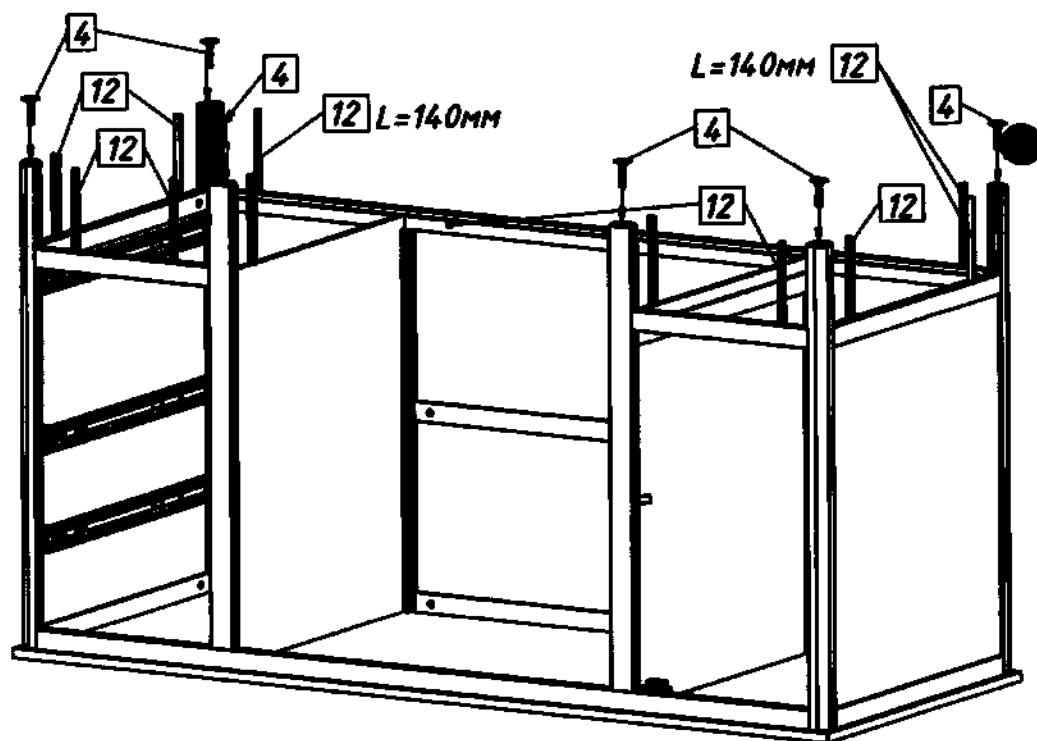


После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.

19 этап

Произведите сборку деталей для каркаса выдвижного ящика
Соберите каждую стенку
О, П, Р в 2-х
экземплярах.

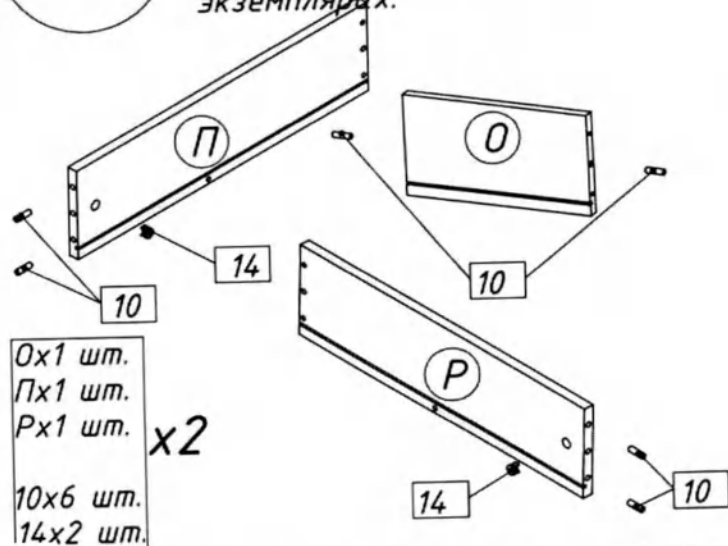


Соберите стенки АА, ББ, ВВ

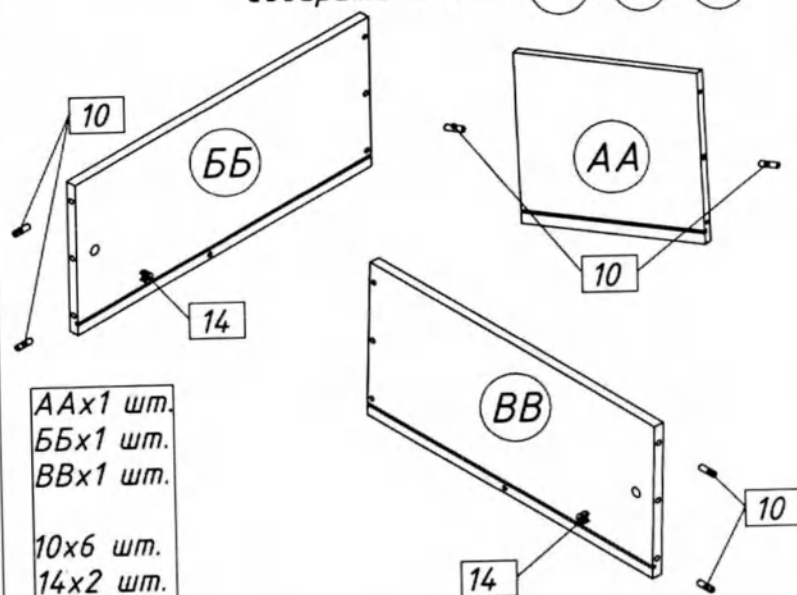

20 этап


Произведите сборку каркаса выдвижного
ящика в 2-х экземплярах.

0x1 шт.
Пx1 шт.
Рx1 шт. x2
3x4 шт.

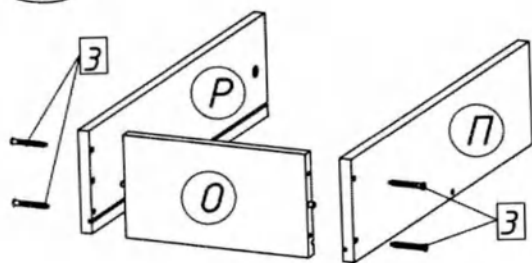

Произведите сборку каркаса
нижнего ящика.

ААx1 шт.
ББx1 шт.
ВВx1 шт.
3x4 шт.

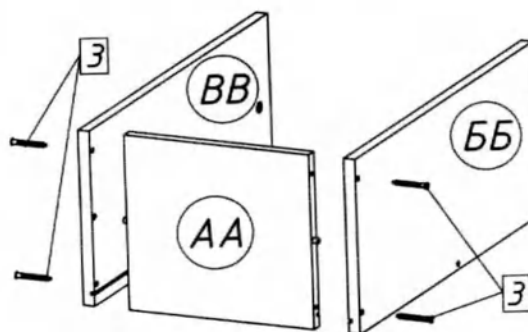


Произведите установку дна для каркасов 3-х выдвижных ящиков


Тx3 шт.

21 этап


Окрашенная
сторона

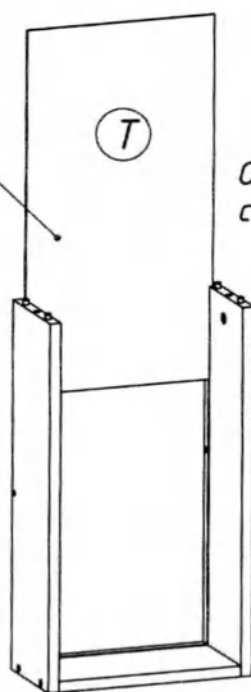


Окрашенная
сторона

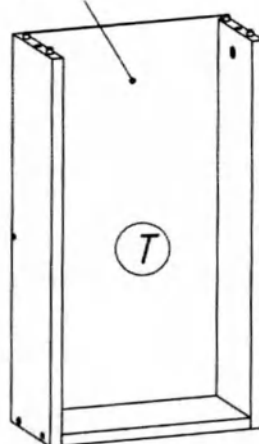

Окрашенная
сторона


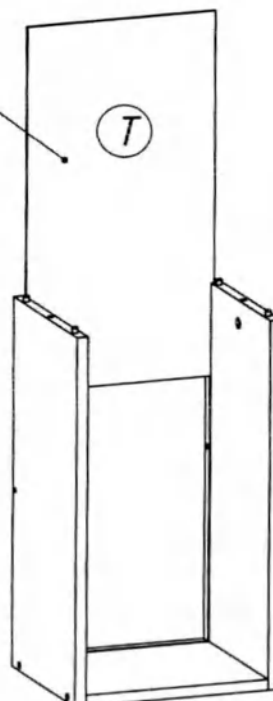


Окрашенная
сторона

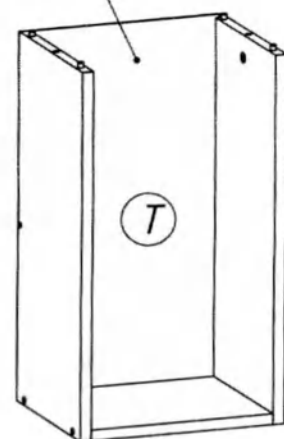

22 этап

Произведите установку планки для каркасов 3-х выдвижных ящиков

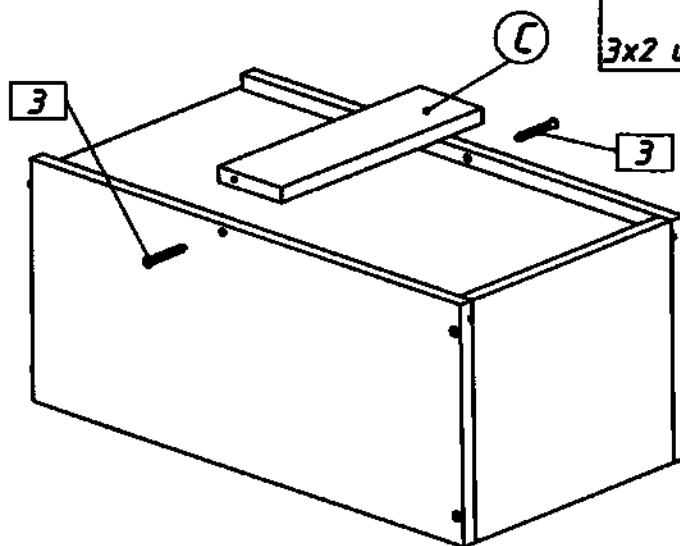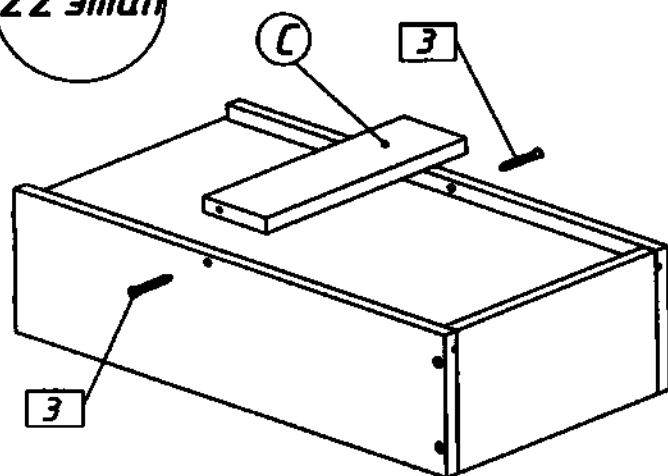


Сх1 шт.
3х2 шт.



х3

23 этап

Произведите сборку 3-х фасадов выдвижных ящиков

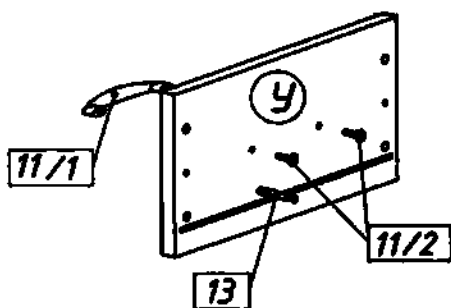

13

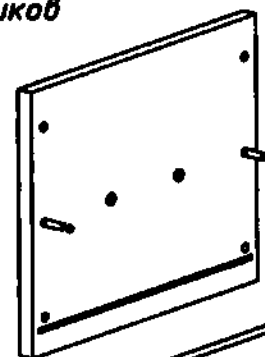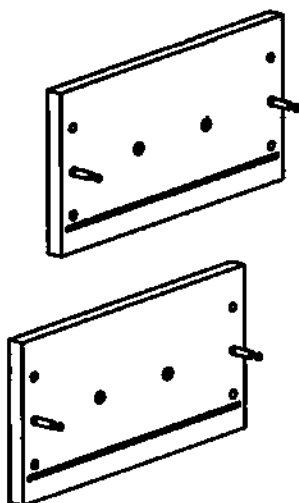

11/1

13

11/2

Ух2 шт.
ГГх1 шт.

11/1х3 шт.
11/2х6 шт.
13х6 шт.

13


Произведите установку фасадов 3-х выдвижных ящиков

Схема фиксации фасада **У** и **ГГ** и
установки заглушек **15**

Ух2 шт.
ГГх1 шт.

15х6 шт.

24 этап


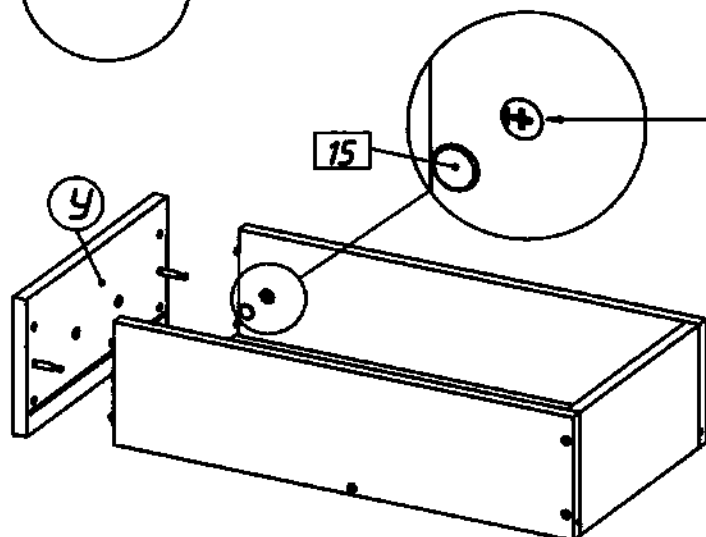


Соединив фасад с каркасом ящика, поверните по часовой стрелке эксцентрики **14** для его фиксации. Затем установите заглушки **15**.

25 этап

Произведите установку направляющих на 3 выдвижных ящика



8х6 шт.
9/1х2 шт. x3

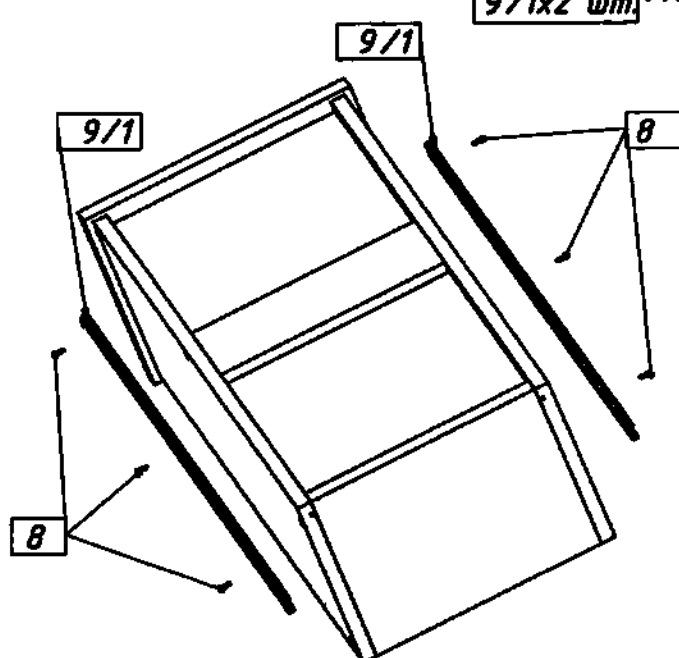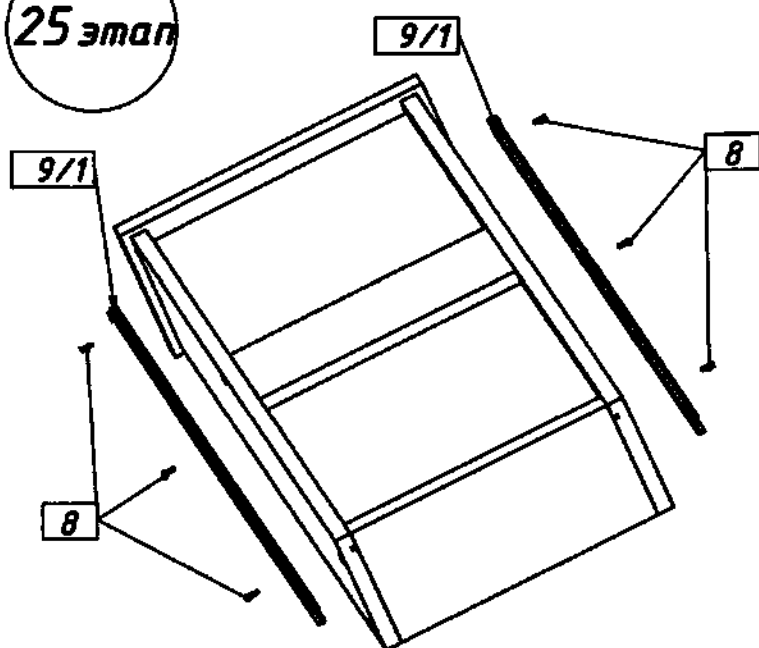

26 этап

Наклейте на один из малых ящиков
самоклеющийся логотип компании

19х1 шт.

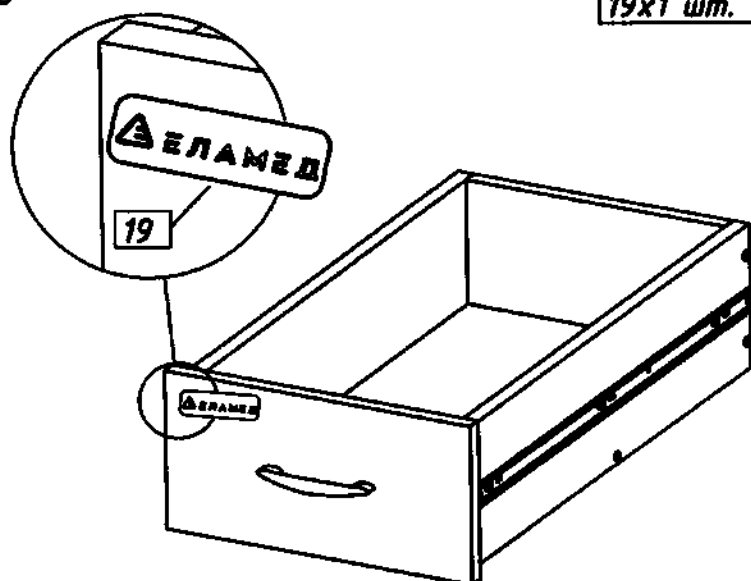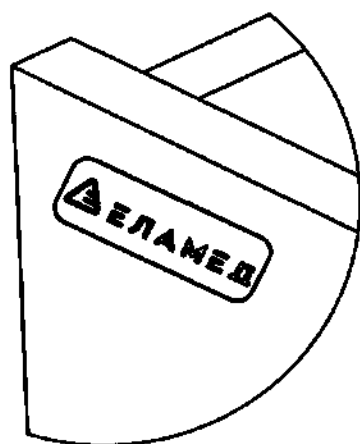

Произведите сборку двери.

27 этап


Фх1 шт.

8х1 шт.

11/1х1 шт.

11/2х2 шт.


16/2х1 шт.

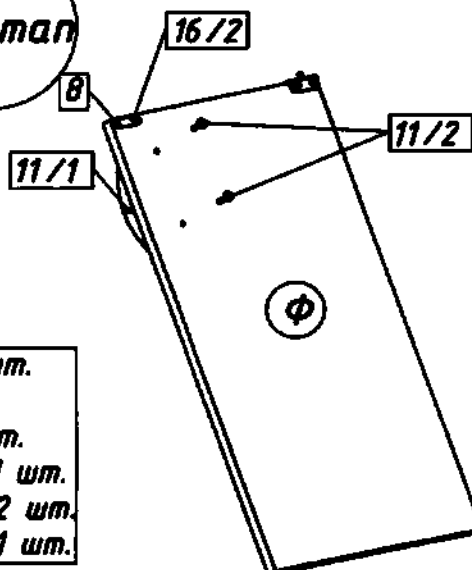**28 этап**

Произведите установку ящиков и полок.

Чх1 шт.

Шх1 шт.

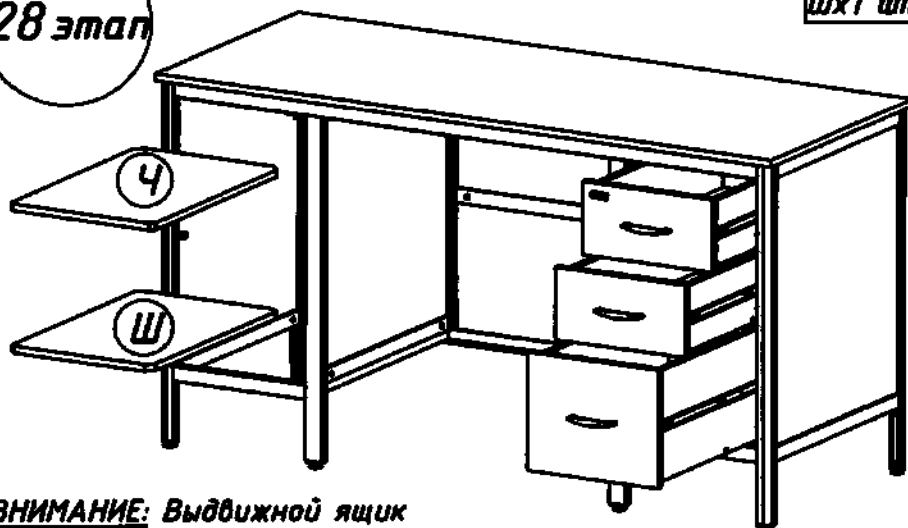

ВНИМАНИЕ: Выдвижной ящик с наклеенным логотипом компании должен быть установлен в верхней части встроенной тумбы

Произведите установку двери.

29 этап**ВНИМАНИЕ!!!**


Во избежание повреждения двери стола её установку рекомендуется выполнять сборщикам в количестве 2-х человек. Также перед её установкой необходимо проверить:

- винты замков установленных прогонов надежно затянуты, и стол не имеет диагональных перекосов;
- наличие в каждой петле [18] пластиковых колпачков на затяжных винтах.


Если хотя бы одно из условий не соблюдено, дальнейшая сборка и эксплуатация изделия **ЗАПРЕЩЕНА!!!**

Фх1 шт.

18х1 компл.

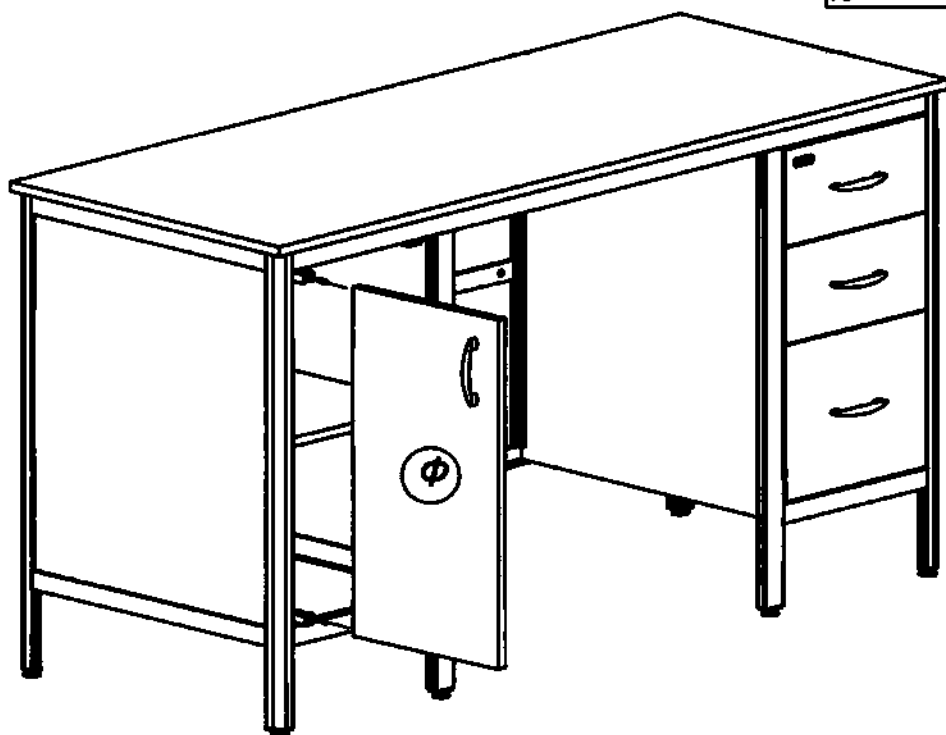


Установите нижнюю петлю [18]

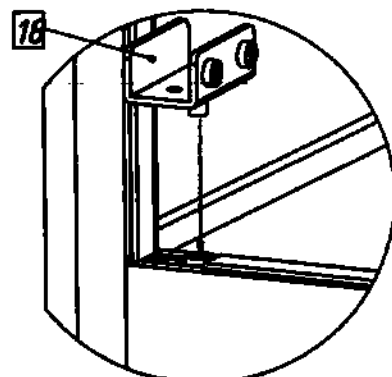


Установив верхнюю петлю [18] и придерживая её от выпадения, вставьте между петель дверь без перекосов.

Схема установки двери в петле

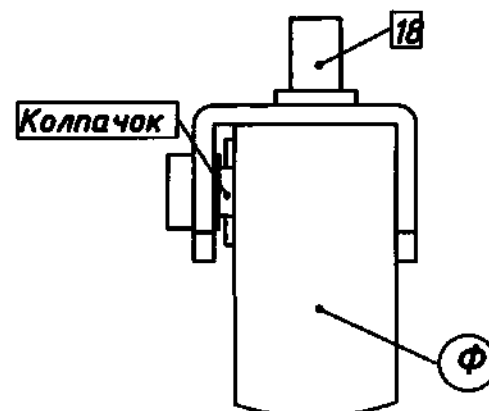

Внимание: Установку двери производить только в вертикальном положении стола. После установки двери необходимо затянуть все фиксирующие винты петель [18] до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки винтов. Это может привести к порче двери.

30 этап

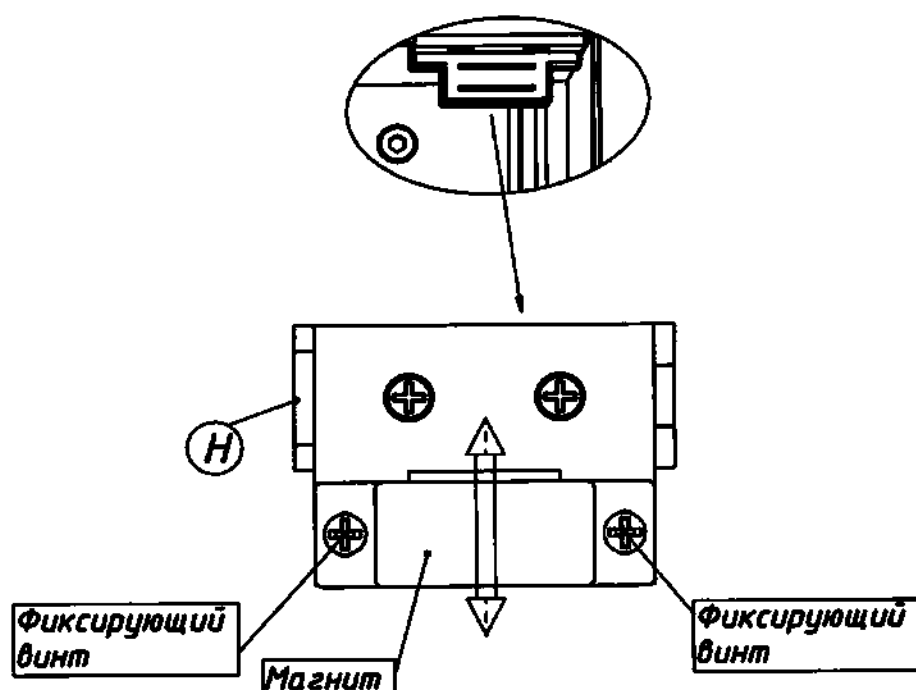

Открыв дверь из ЛДСП, при необходимости ослабьте фиксирующие винты и сдвиньте в требуемое положение магнит. После завершения регулировки затяните на магните фиксирующие винты до ощутимого сопротивления. Опасайтесь чрезмерной затяжки фиксирующих винтов на магните. Это может привести к порче его корпуса.

Дверь в закрытом положении



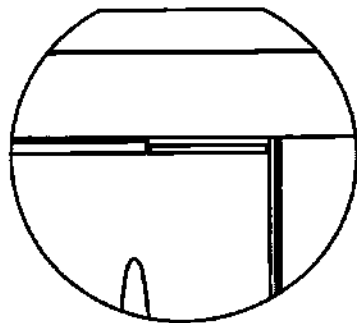



Схема фиксации двери магнитом

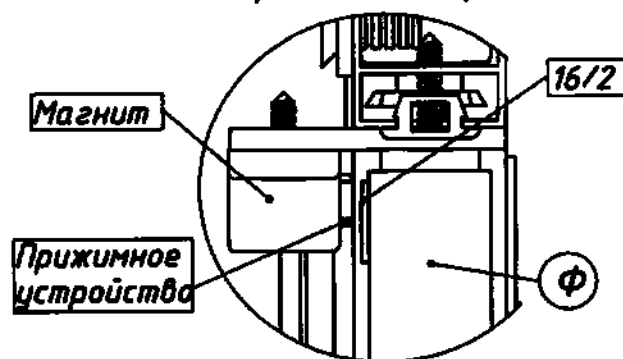

Сборка изделия завершена

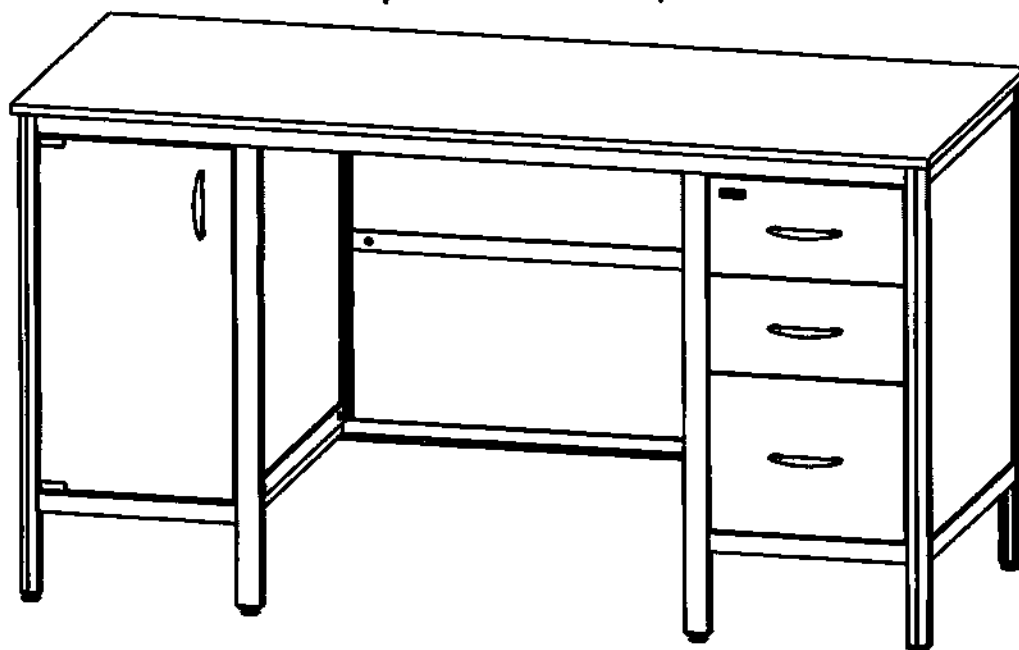

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942810.114ТУ
Стол для размещения медицинских изделий (мод. 1)

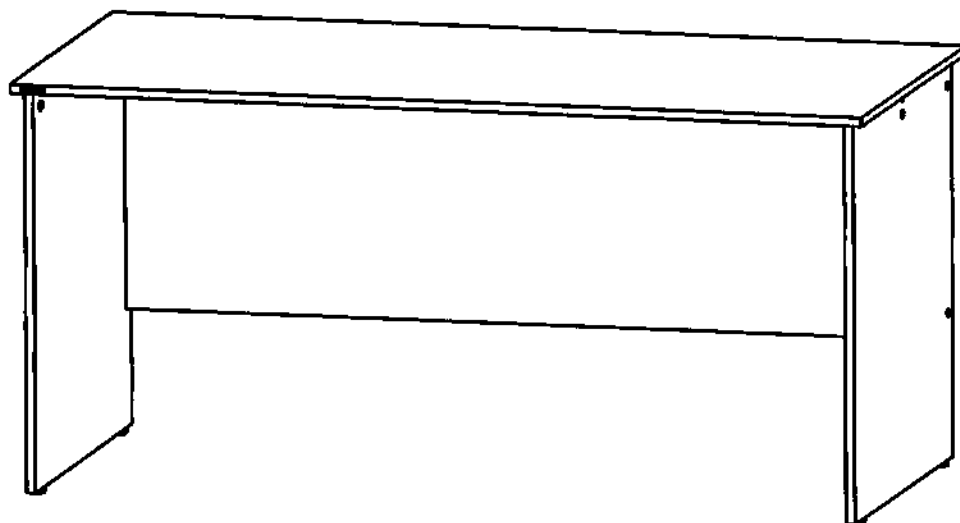

Условные обозначения:

1. А-Д : детали


2. 1 - 9 : крепёж и фурнитура

.. 1 - 10 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	1
Д	Упор столешницы	1

Крепёж и фурнитура

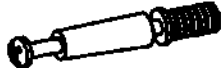Арт.	Кол - во	Обозначение	
1*	8	Конфирмат	
2	8	Заглушка конфирмата	
3	8	Шкант мебельный	
4	4	Опора стола	
5	8	Эксцентрик	
6	8	Шток эксцентрика	
7	8	Заглушка эксцентрика	
8*	1	Ключ шестигранный	
9	1	Логотип компании	

* Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранным **8** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап


Произведите сборку стенки левой

Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

Бх1 шт.

4х2 шт.

5х2 шт.

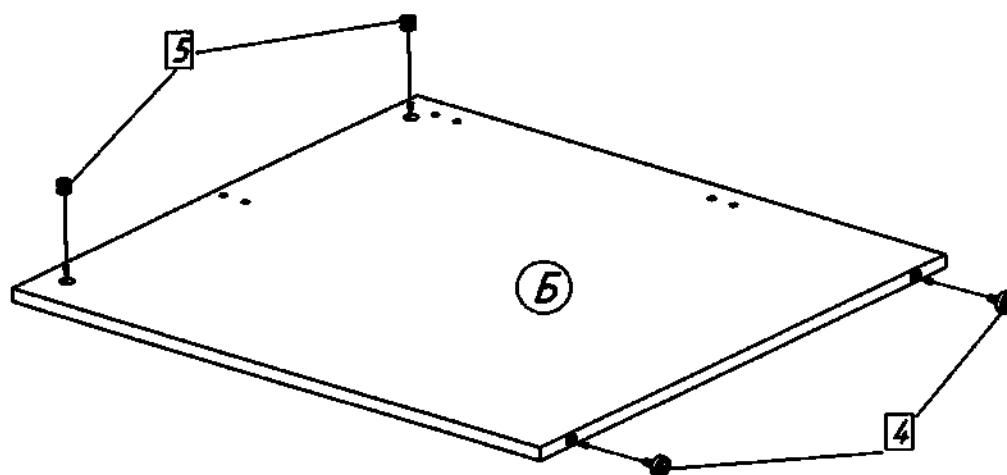

Ножки мебельные [4]
установить путем
вкручивания их по
часовой стрелке.


2 этап

Произведите сборку стенки правой

Вх1 шт.

4х2 шт.

5х2 шт.

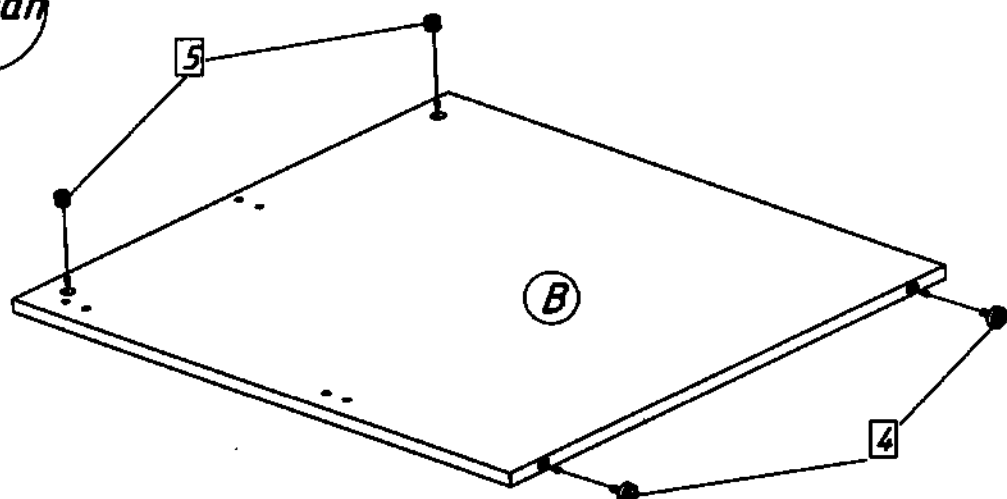

Ножки мебельные [4]
установить путем
вкручивания их по
часовой стрелке.


3 этап

Произведите сборку стенки задней

Гх1 шт.


3х4 шт.

5х2 шт.

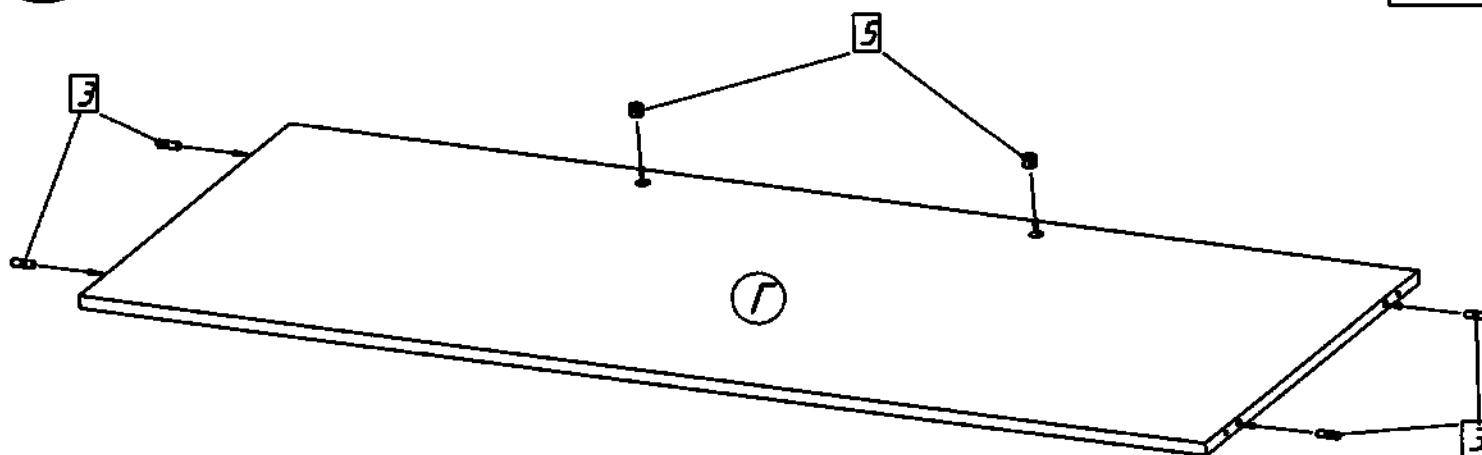


Произведите сборку каркаса стола, соединив между собой стенку левую, стенку правую, стенку заднюю

4 этап

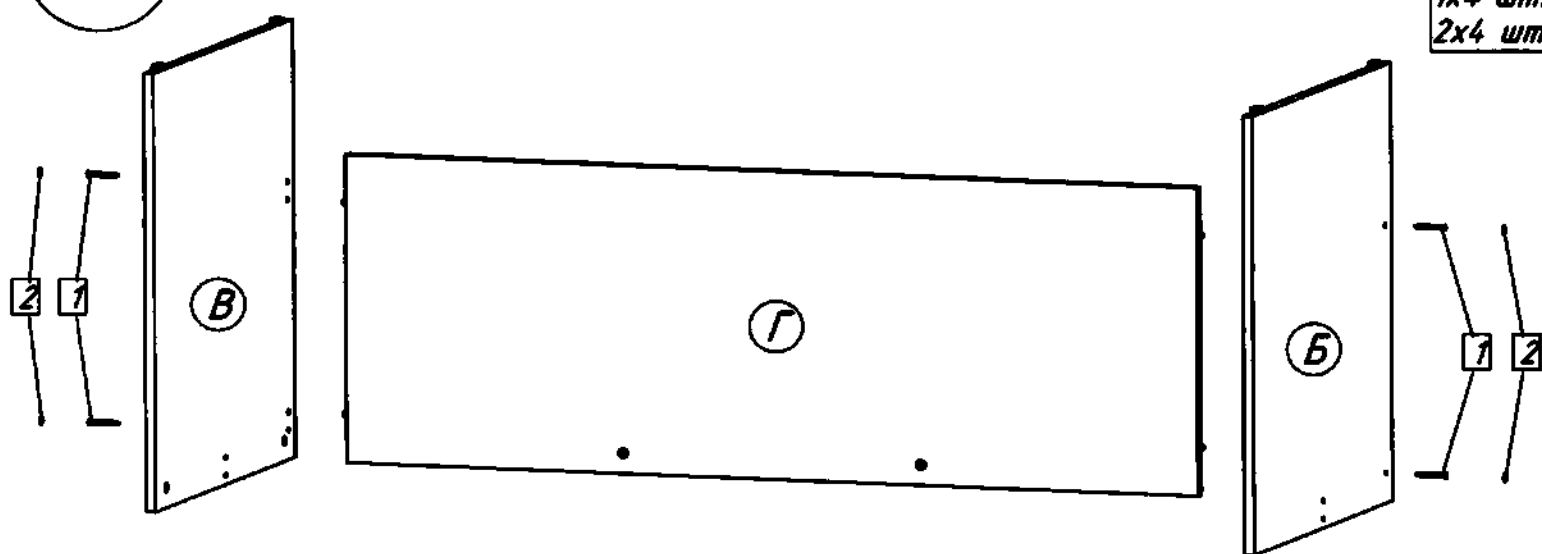


5 этап

Произведите сборку упора столешницы

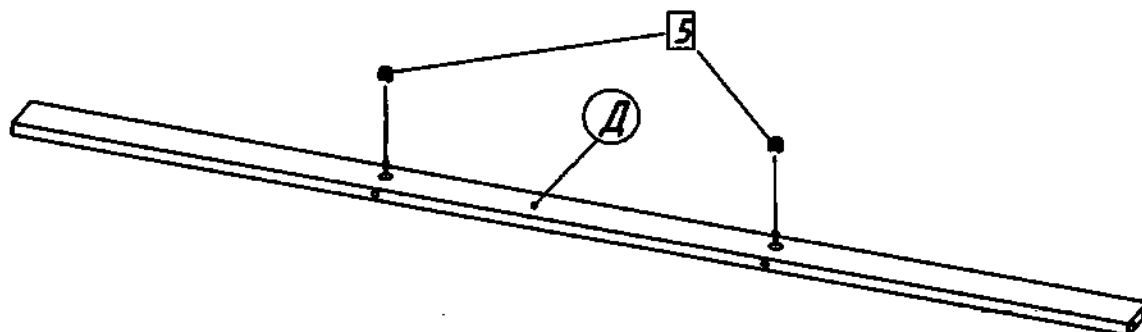

6 этап

Произведите установку упора столешницы на каркас

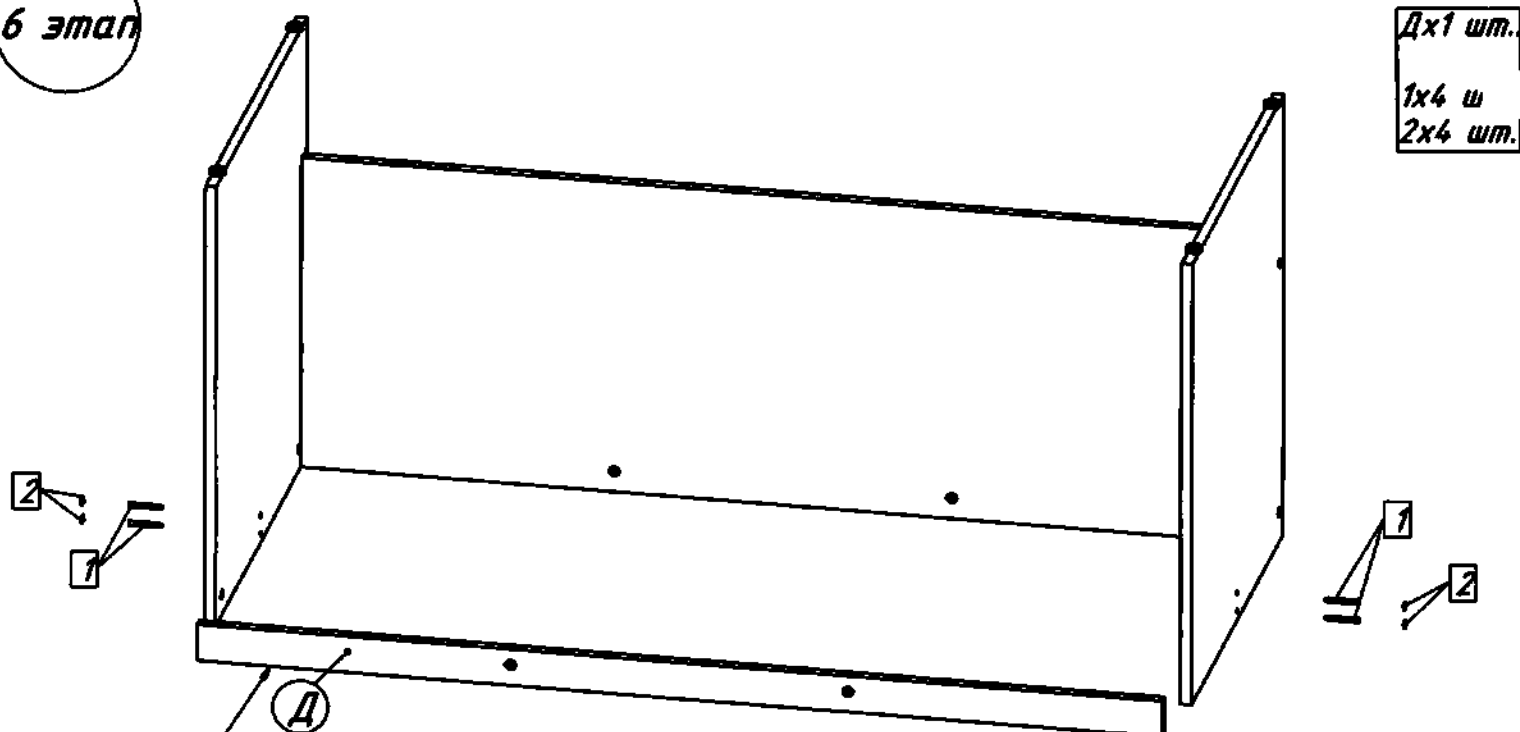


После установки упора столешницы переверните каркас и поставьте его на ножки.

ОМ 29.427.01

Произведите установку шкантов

3x4 шт.

7 этап

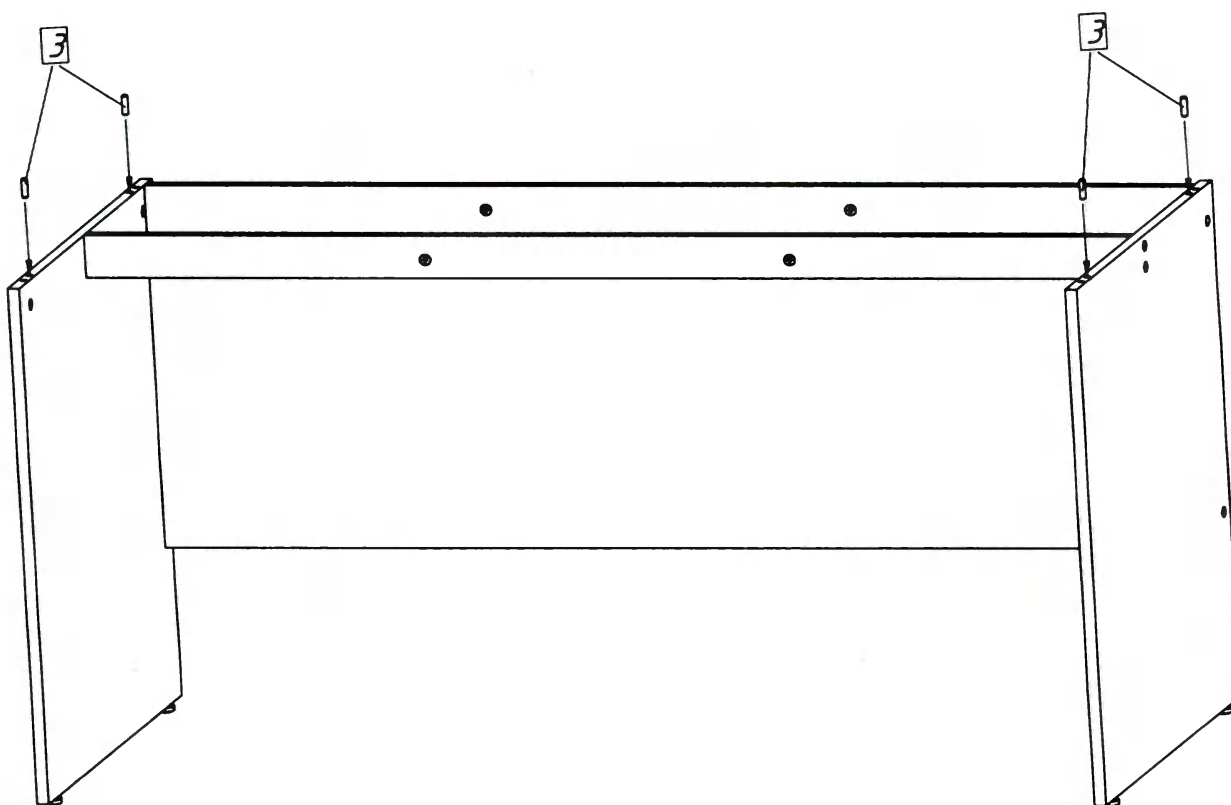


Произведите сборку столешницы

4x1 шт.

6x8 шт.


8 этап

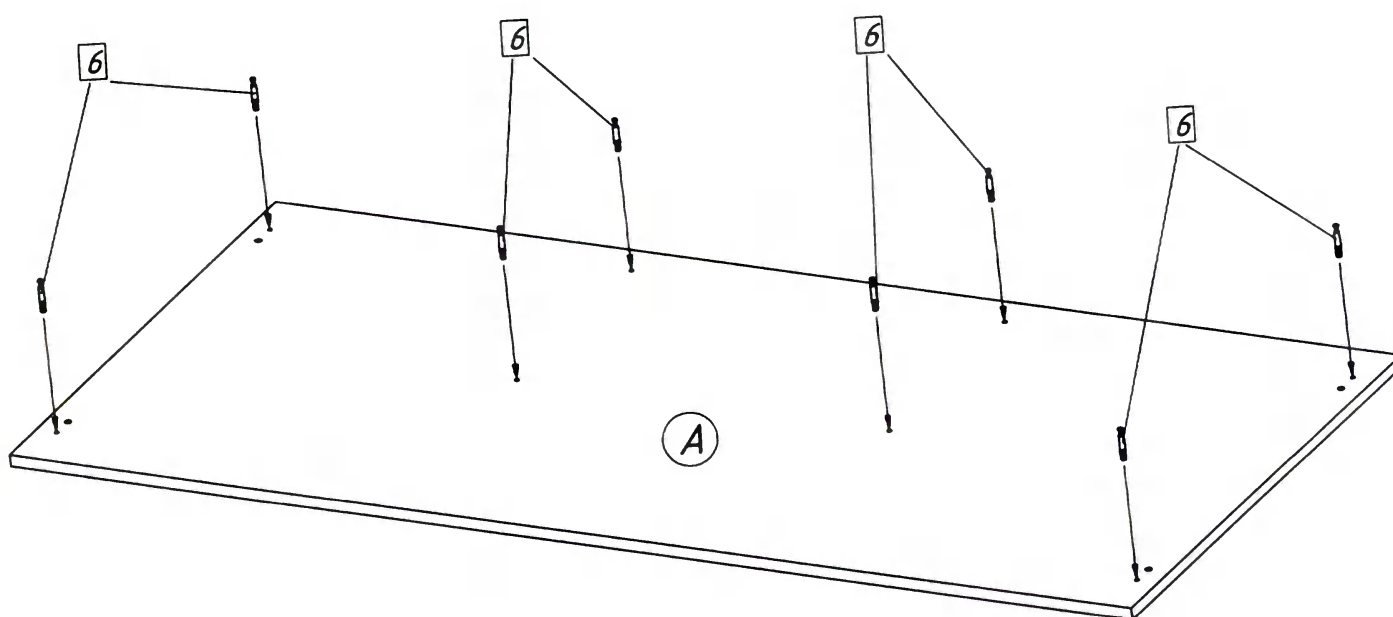

Ах1 шт.

7х8 шт.



9 этап

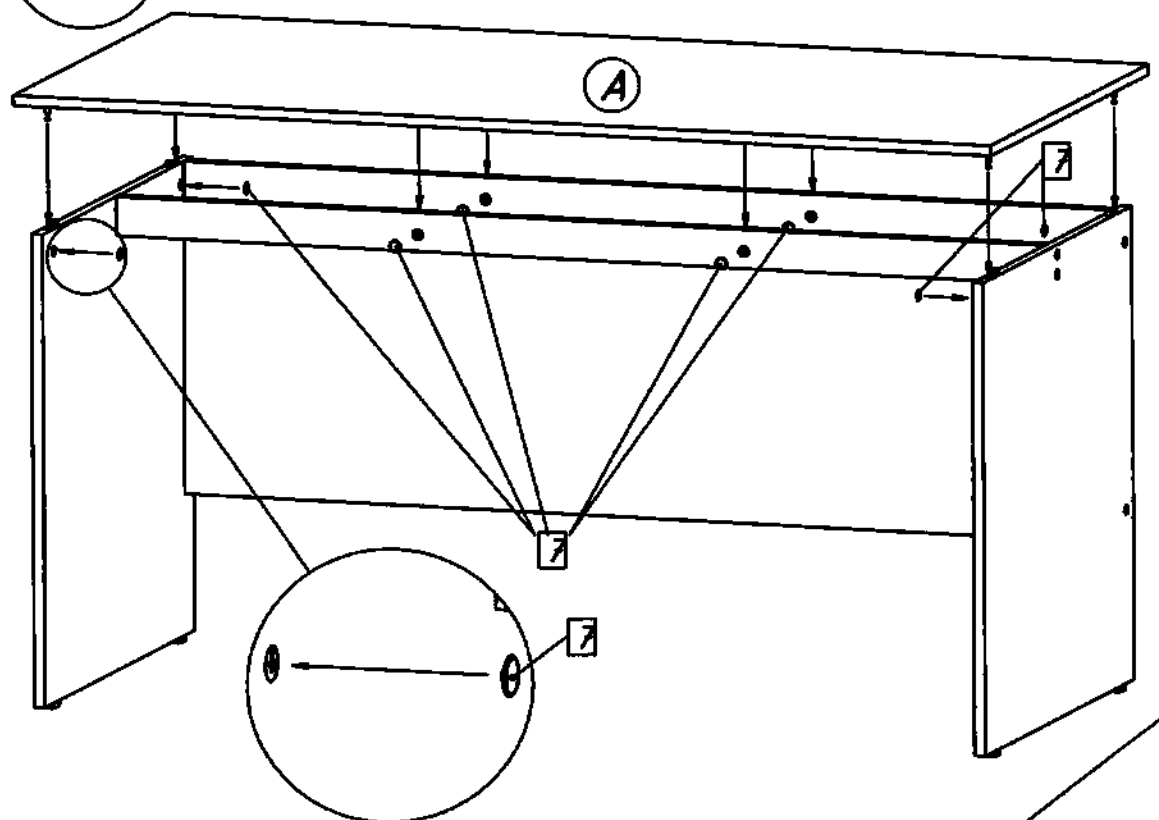


Установив столешницу, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке восемь эксцентриков [5]. После этого установите заглушки эксцентриков [7].

10 этап


Наклейте самоклеящийся логотип компании

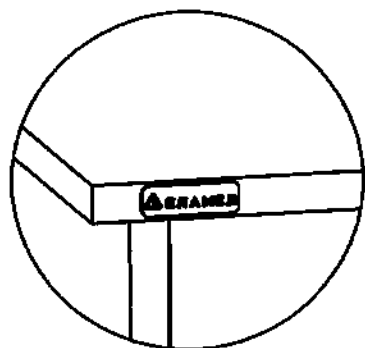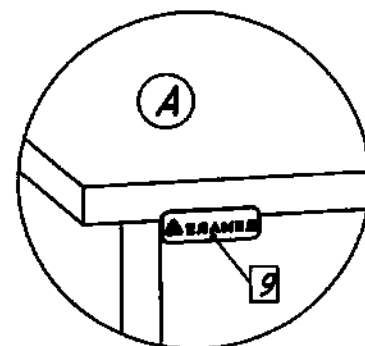

Сборка изделия завершена

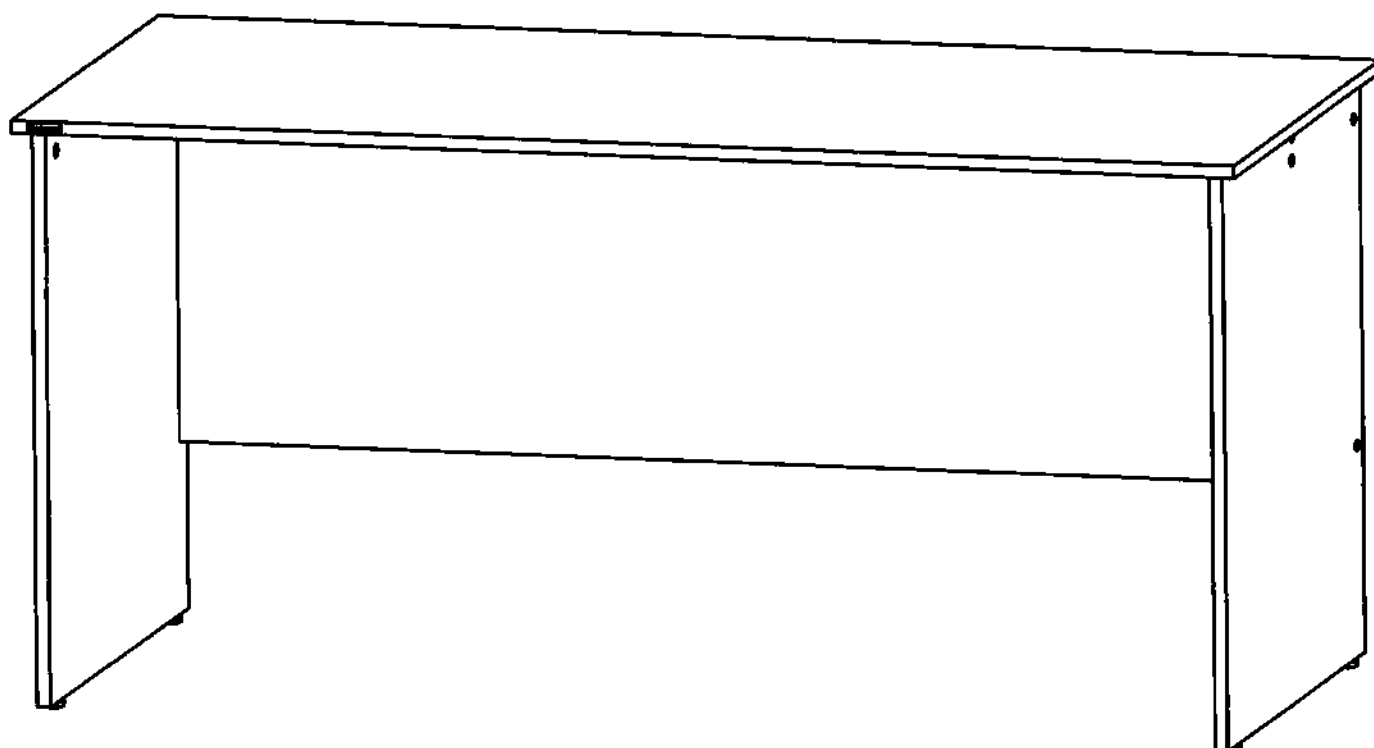

Инструкция по сборке изделия
Столы медицинские по ГИКС.942810.114 ТУ
Стол для размещения медицинских изделий (мод. 2)

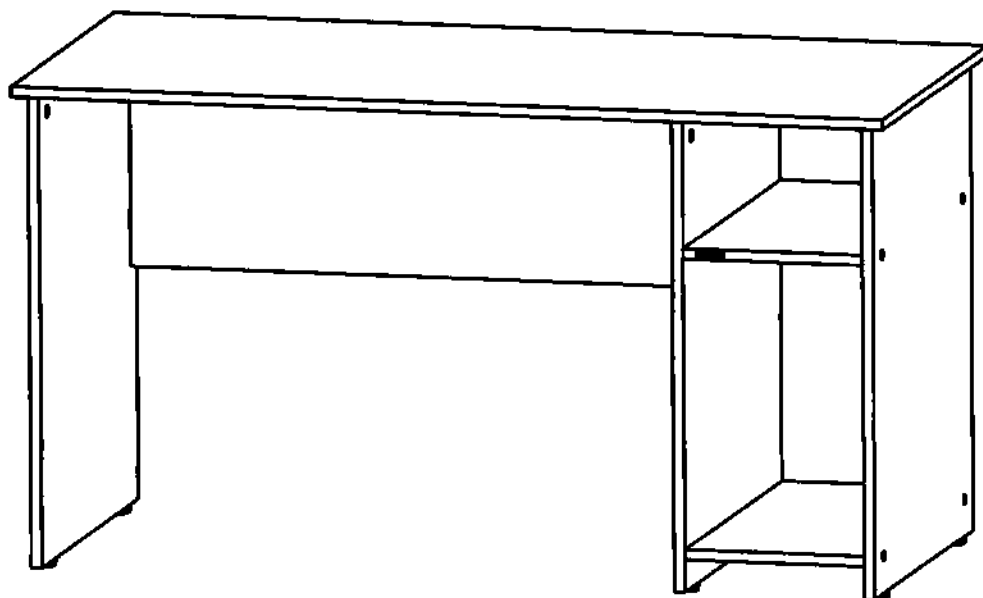

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали

2. 1 - 10 : крепёж и фурнитура

.. 1 - 10 : этапы сборки

Код товара

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Стенка задняя	1
Д	Стенка средняя	1
Е	Основание тумбы	1
Ж	Полка тумбы	1

Крепёж и фурнитура

Арт.	Кол - во	Обозначение	
1 *	12	Конфирмат	
2	12	Заглушка конфирмата	
3	14	Шкант мебельный	
4	6	Эксцентрик	
5	6	Шток эксцентрика	
6	6	Заглушка эксцентрика	
7	1	Логотип компании	
8 *	1	Ключ шестигранный	
9	6	Опора стола	

* Конфирматы **1** закручивать ключом шестигранным **8** заподлицо с кромкой до ощутимого сопротивления

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия

1 этап

Произведите сборку стенки левой


Рекомендации по сборке: разложите на твердой поверхности несколько листов гофрокартона и на них производите сборку изделия.

5x1 шт.

3x2 шт.

4x2 шт.

9x2 шт.

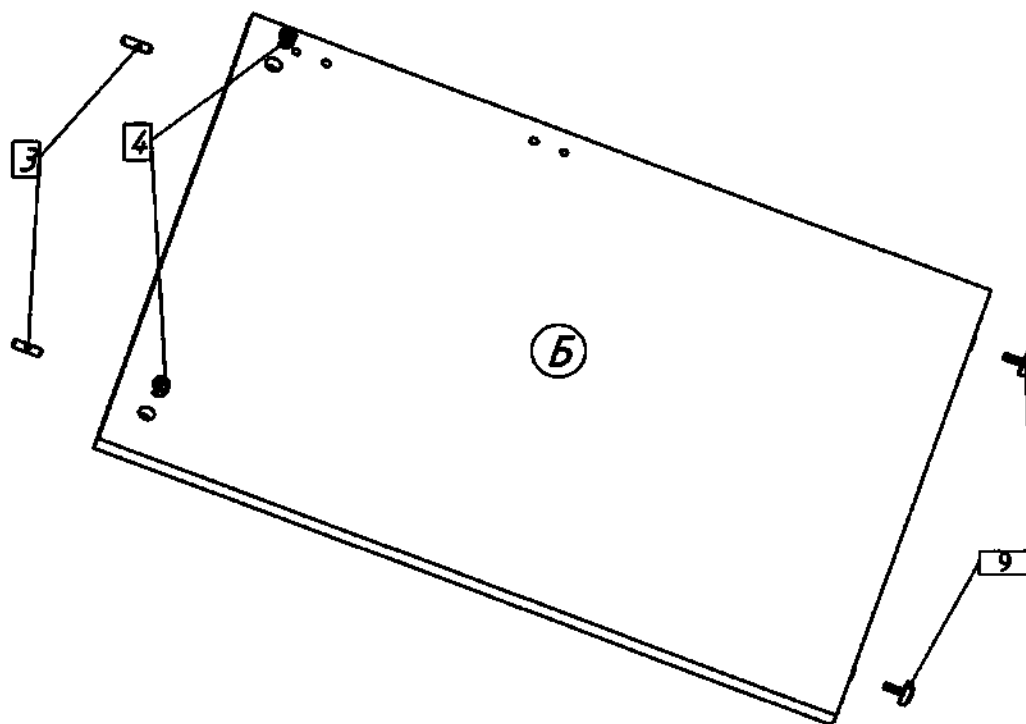

2 этап


Произведите сборку стенки правой

8x1 шт.

3x2 шт.

4x2 шт.

9x2 шт.

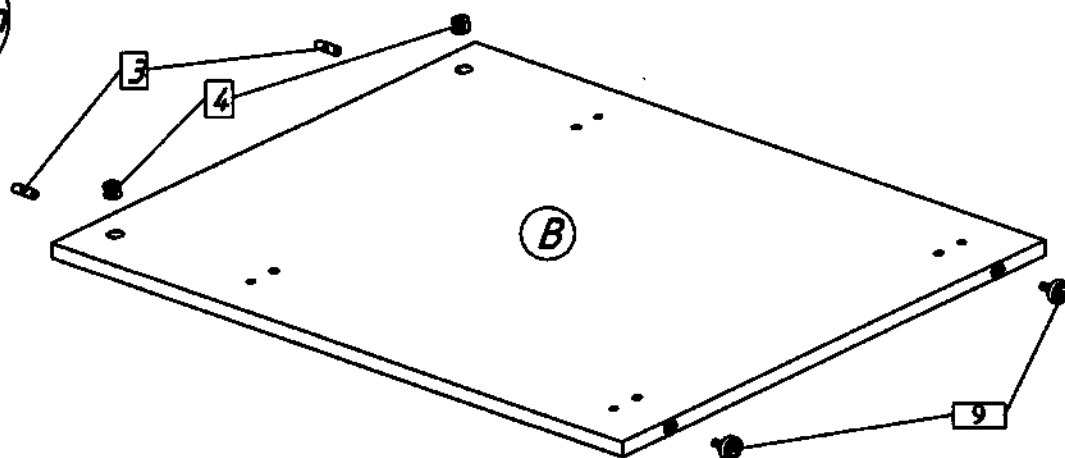


3 этап

Произведите сборку стенки задней

7x1 шт.

3x4 шт.

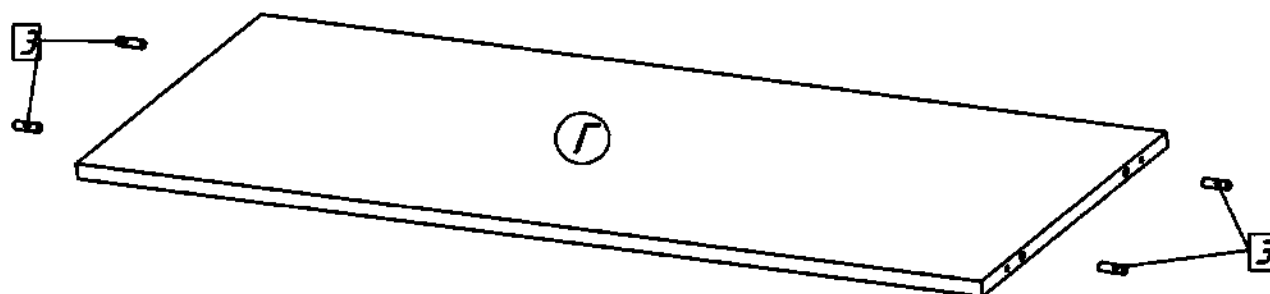

Произведите сборку стенки средней


4 этап

Дх1 шт.

3х2 шт.

4х2 шт.

9х2 шт.

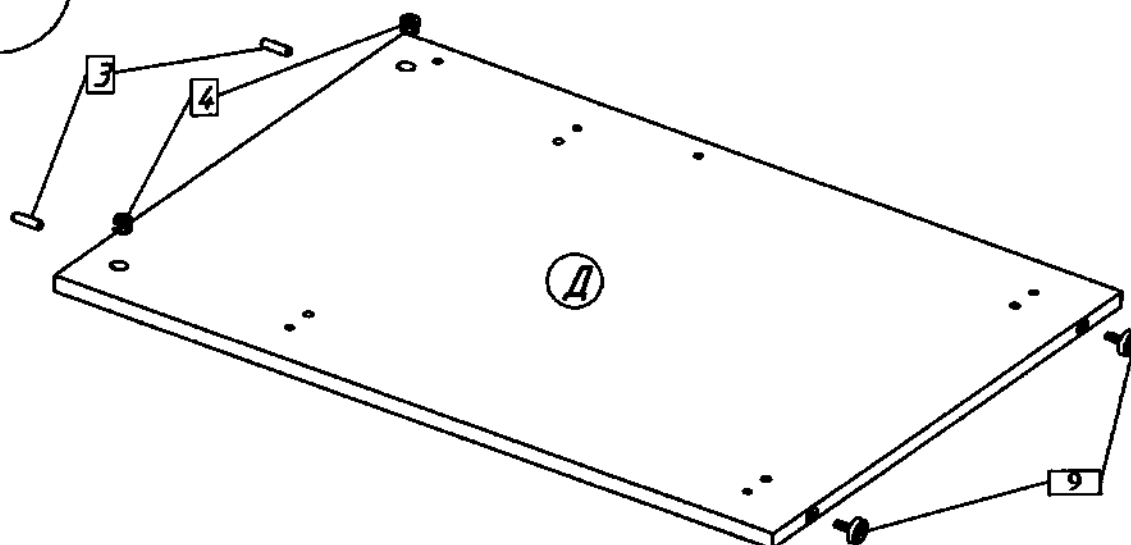


Произведите сборку основания и полки тумбы

5 этап

Ех1 шт.

Жх1 шт.

3х8 шт.

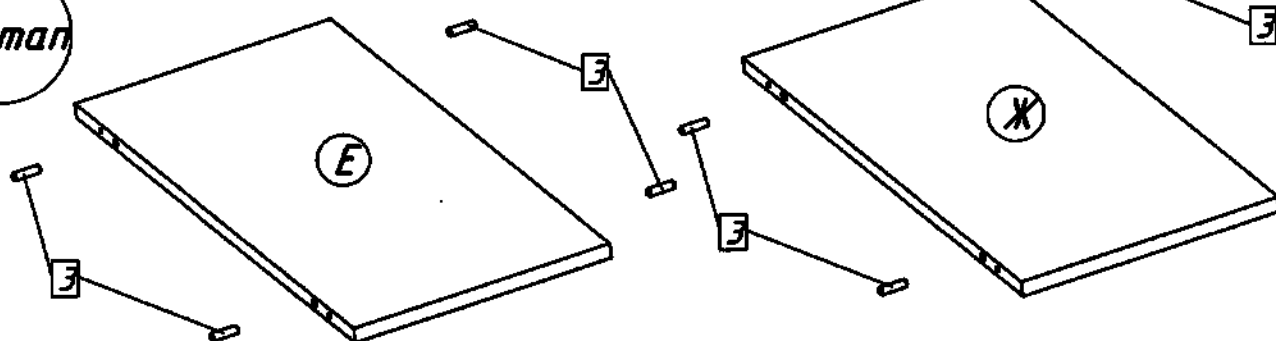

6 этап

Произведите сборку каркаса стола, соединив между собой стенку левую, стенку среднюю и стенку заднюю


Бх1 шт.

Гх1 шт.

Дх1 шт.

1х4 шт.


2х4 шт.

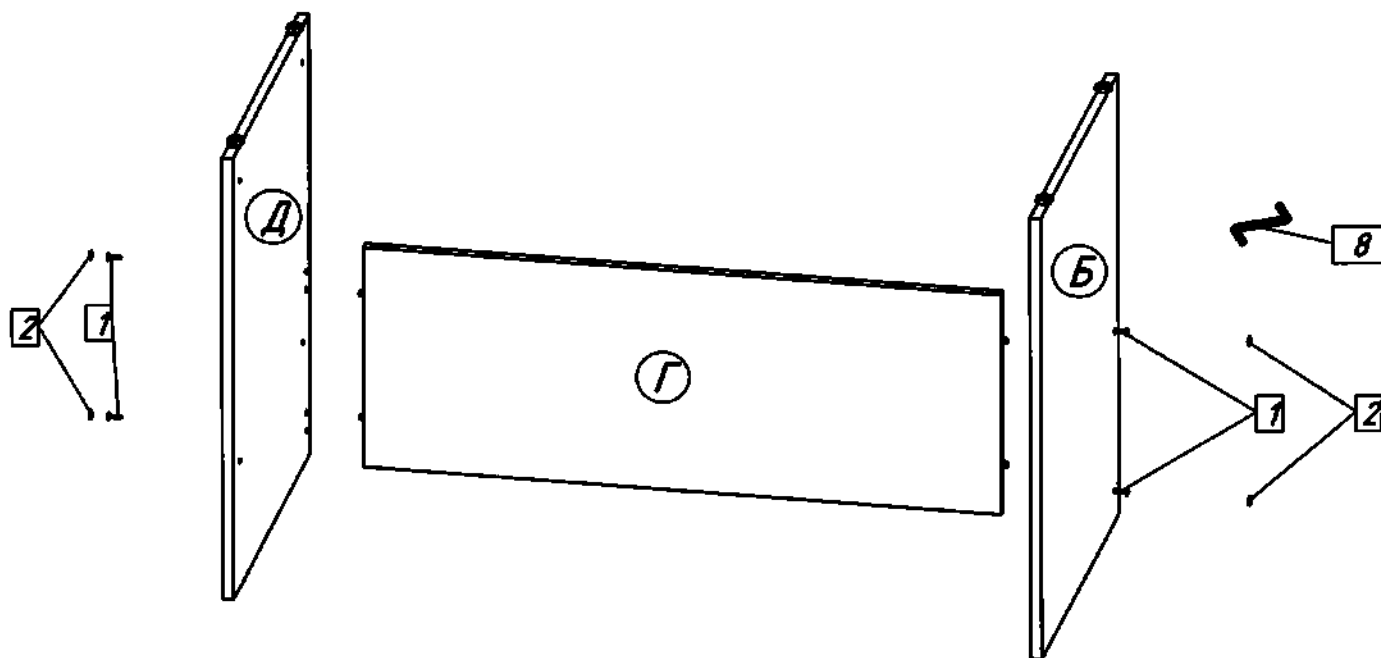

ОМ 29.1264.01

Закончите сборку каркаса стола


7 этап

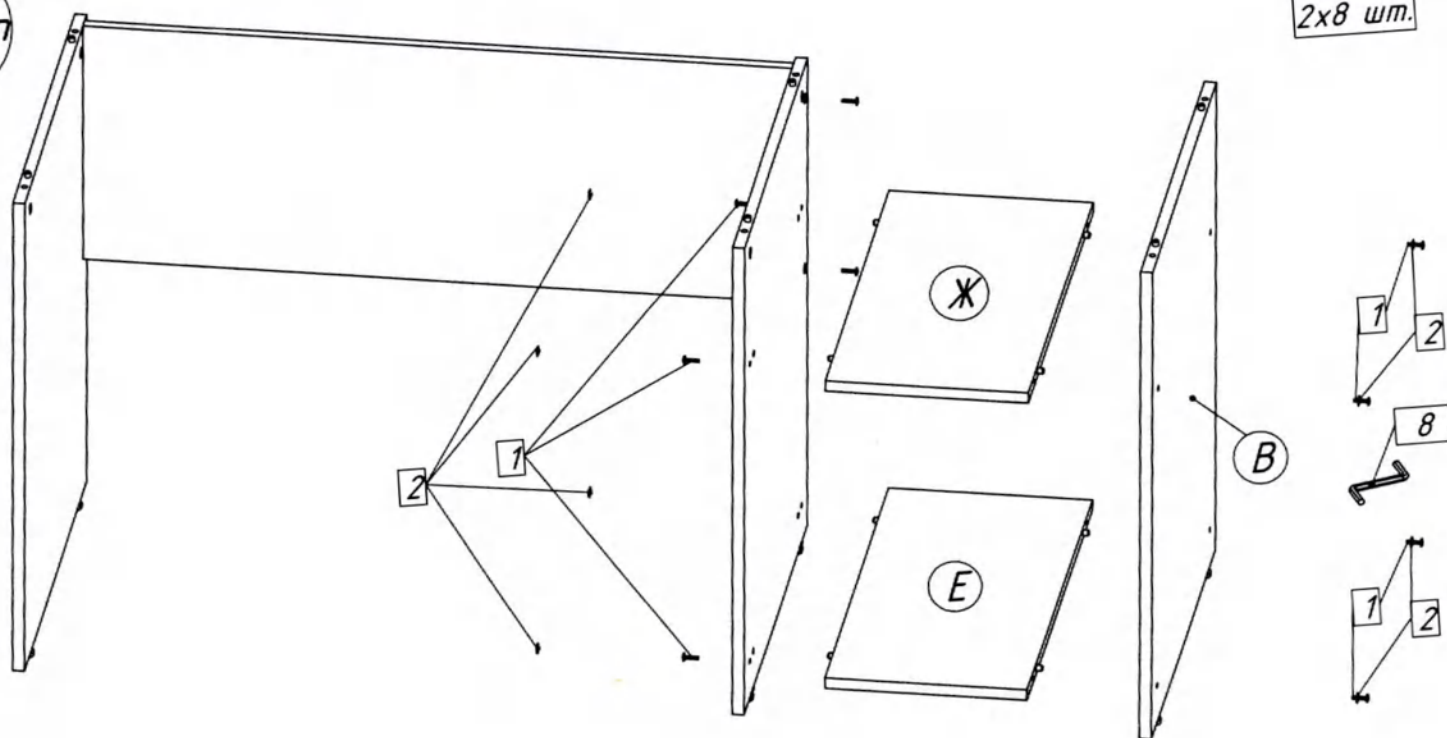

Bx1 шт.
Ex1 шт.
Жx1 шт.
1x8 шт.
2x8 шт.

8 этап

Произведите сборку столешницы

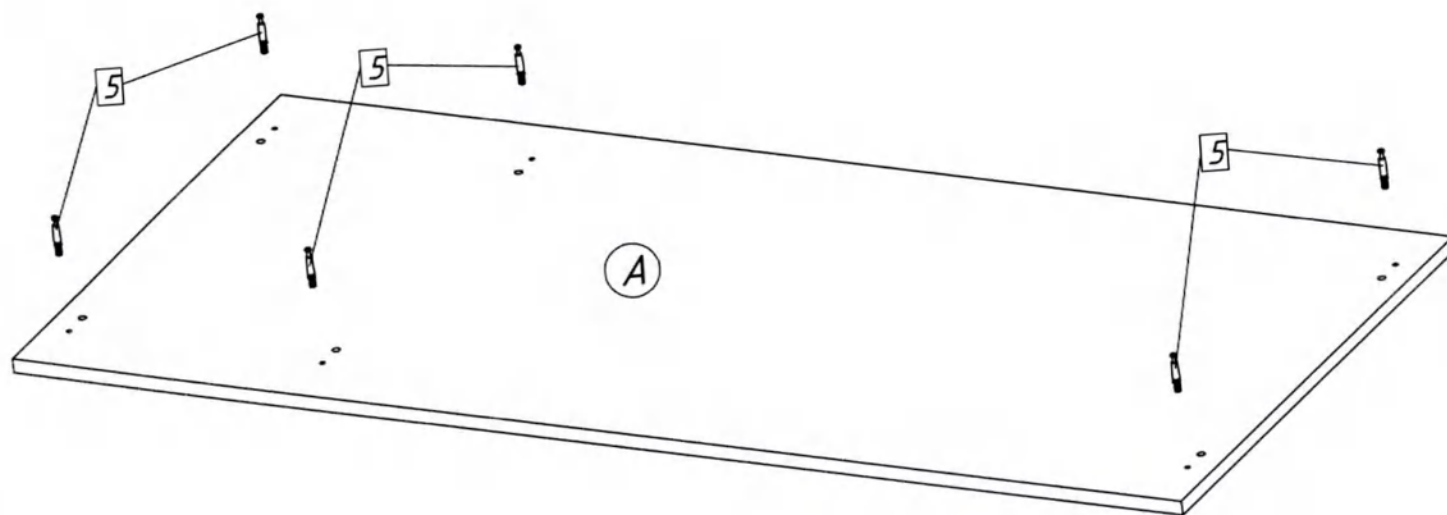

Ax1 шт.
5x6 шт.

ОМ 29.1264.01


Произведите установку столешницы

Установив столешницу, зафиксируйте её, повернув по часовой стрелке шесть эксцентриков 4. После этого установите заглушки эксцентриков 6.

Ax1 шт.

6x6 шт.


9 этап

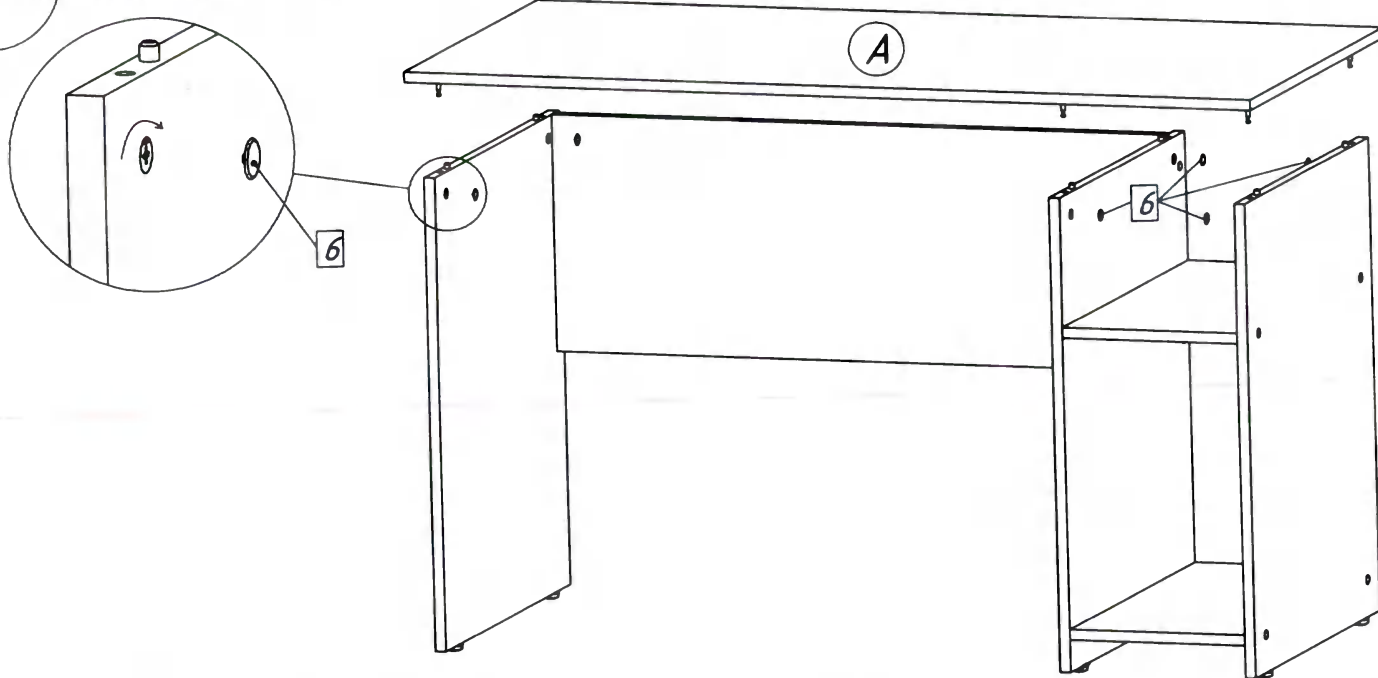


Наклейте самоклеящийся логотип компании

10x1 шт.


10 этап

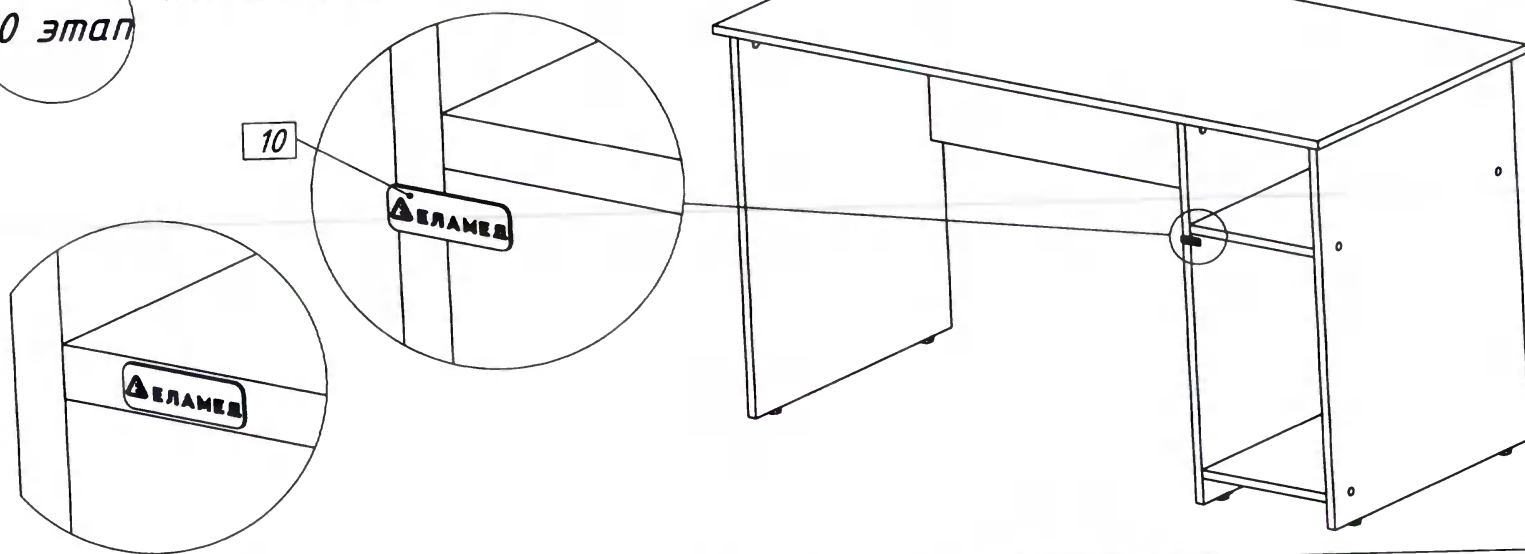

Сборка изделия завершена

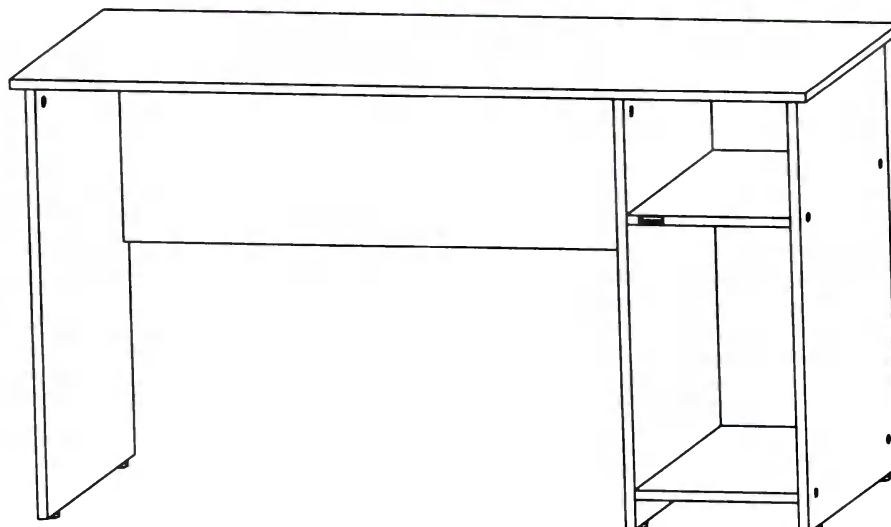

Инструкция по сборке изделия
Стол медицинские по ГИКС.942810.114 ТУ
Стол для размещения медицинских изделий (мод. 3)

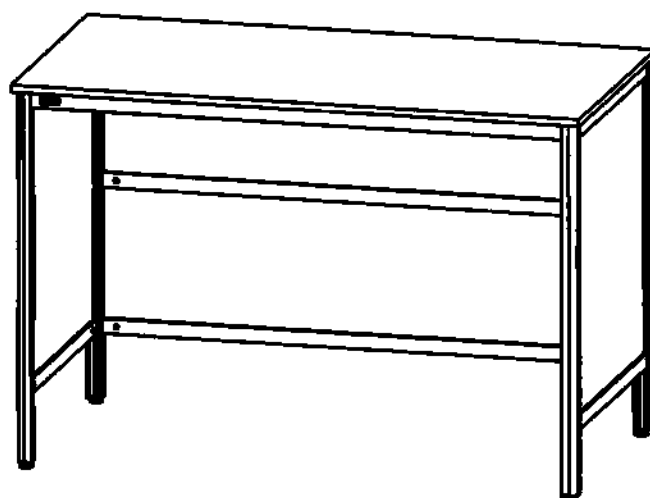

Условные обозначения:

1. А-Ж : детали
2. 1 - 7 : крепёж и фурнитура
3. 1 - 13 : этапы сборки

Детали

№	Наименование	Кол-во
А	Столешница	1
Б	Стенка левая	1
В	Стенка правая	1
Г	Прогон нижний задний	2
Д	Прогон верхний задний	1
Е	Прогон верхний передний	1
Ж	Стенка задняя	2

Крепёж и фурнитура

<i>Арт.</i>	<i>Кол - во</i>	<i>Обозначение</i>	
1	4	<i>Уголок мебельный</i>	
2	4	<i>Евровинт 6,3х13</i>	
3	-	<i>Заглушка декоративная</i>	
4	4	<i>Опора</i>	
5	1	<i>Логотип компании</i>	
6	1	<i>Ключ шестигранный</i>	

Изображения фурнитуры показаны условно и могут отличаться от поставляемых в действительности

Схема сборки изделия


1 этап

Рекомендации для сборки: разложите на твёрдой поверхности несколько листов гофрокартона и на нём производите сборку изделия.

Произведите сборку стенки левой

Бх1 шт.

4х1 шт.

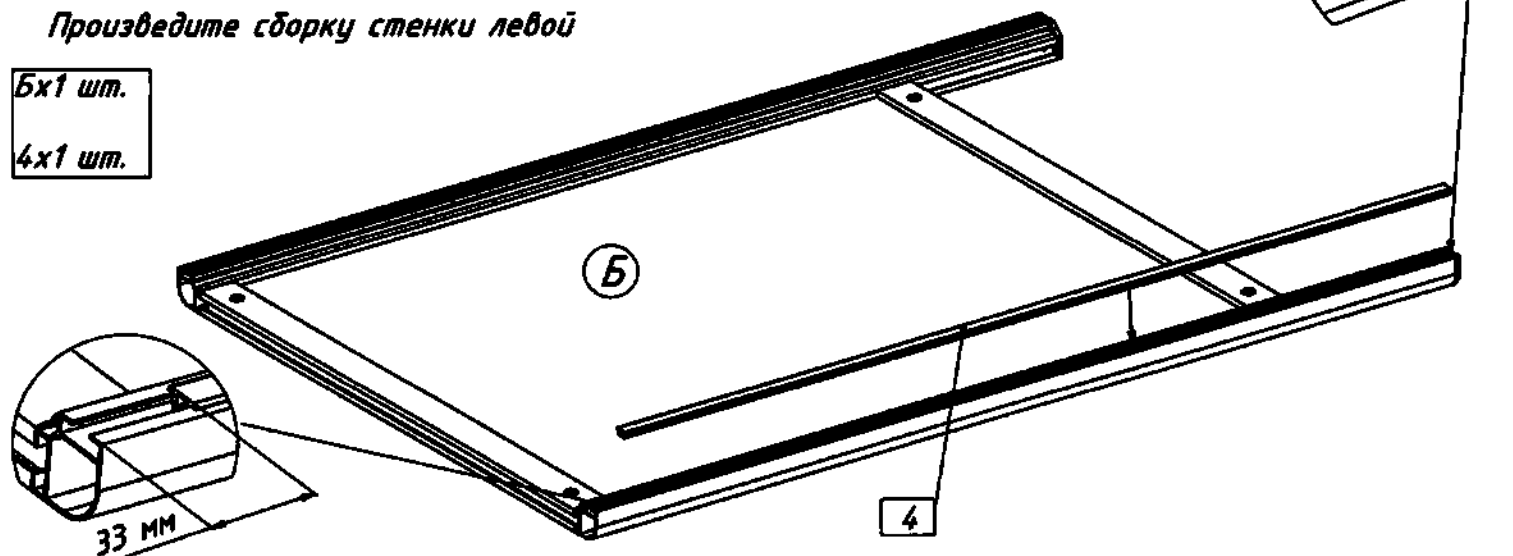


Произведите сборку стенки правой

2 этап

Бх1 шт.

4х1 шт.

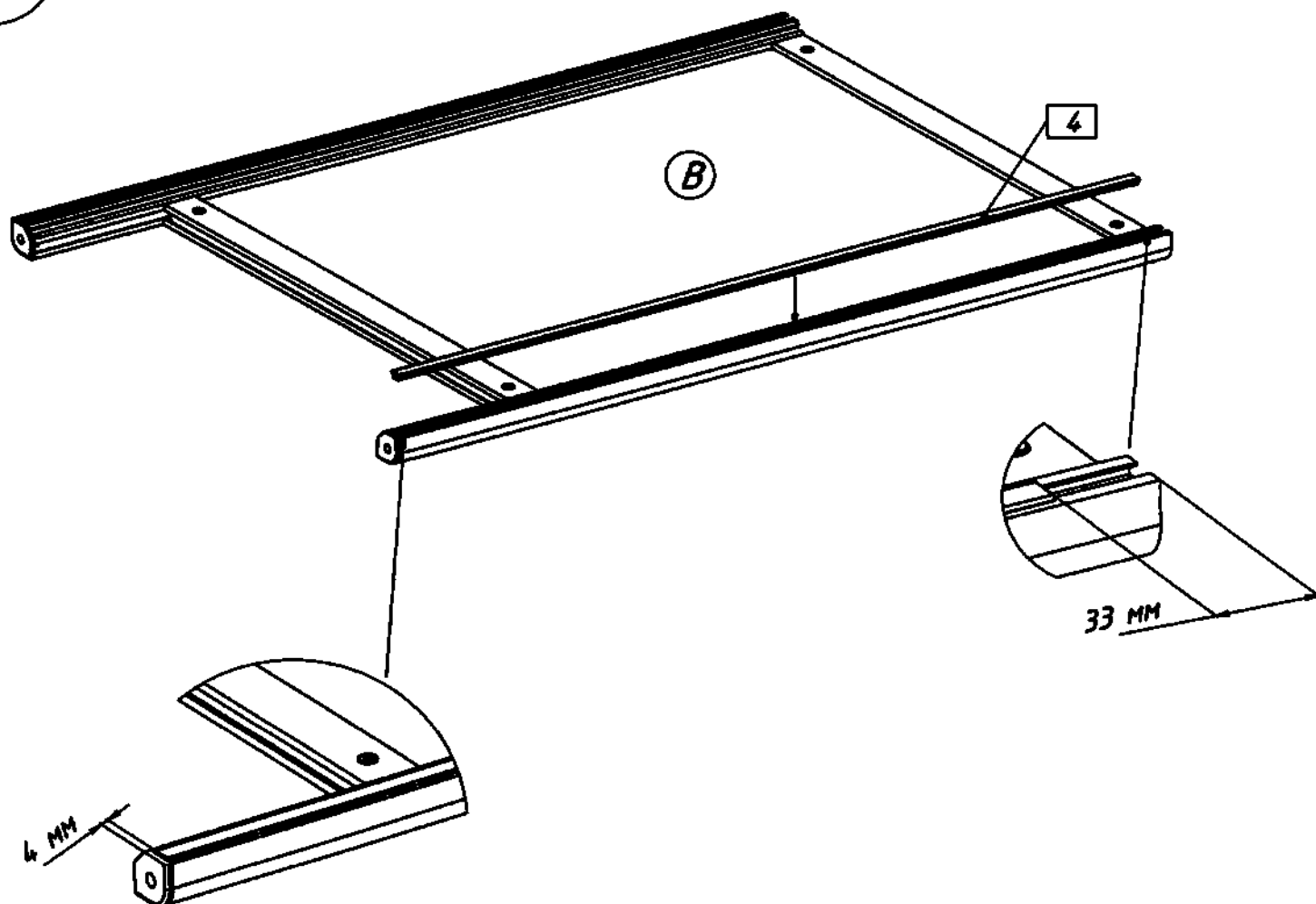



Произведите сборку прогона переднего верхнего (Е)

Ех1 шт.

4х1 шт.

3 этап


Схема установки заглушек 13

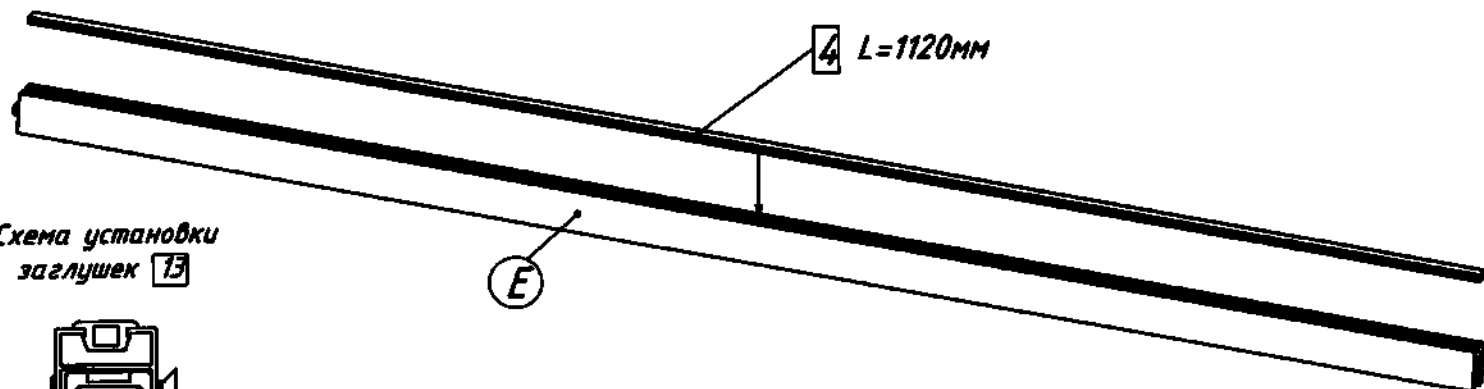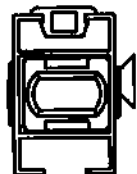

4 этап

Произведите установку прогона нижнего заднего (Г).
Затяните винты замков прогона, тем самым зафиксировав его.

Гх1 шт.

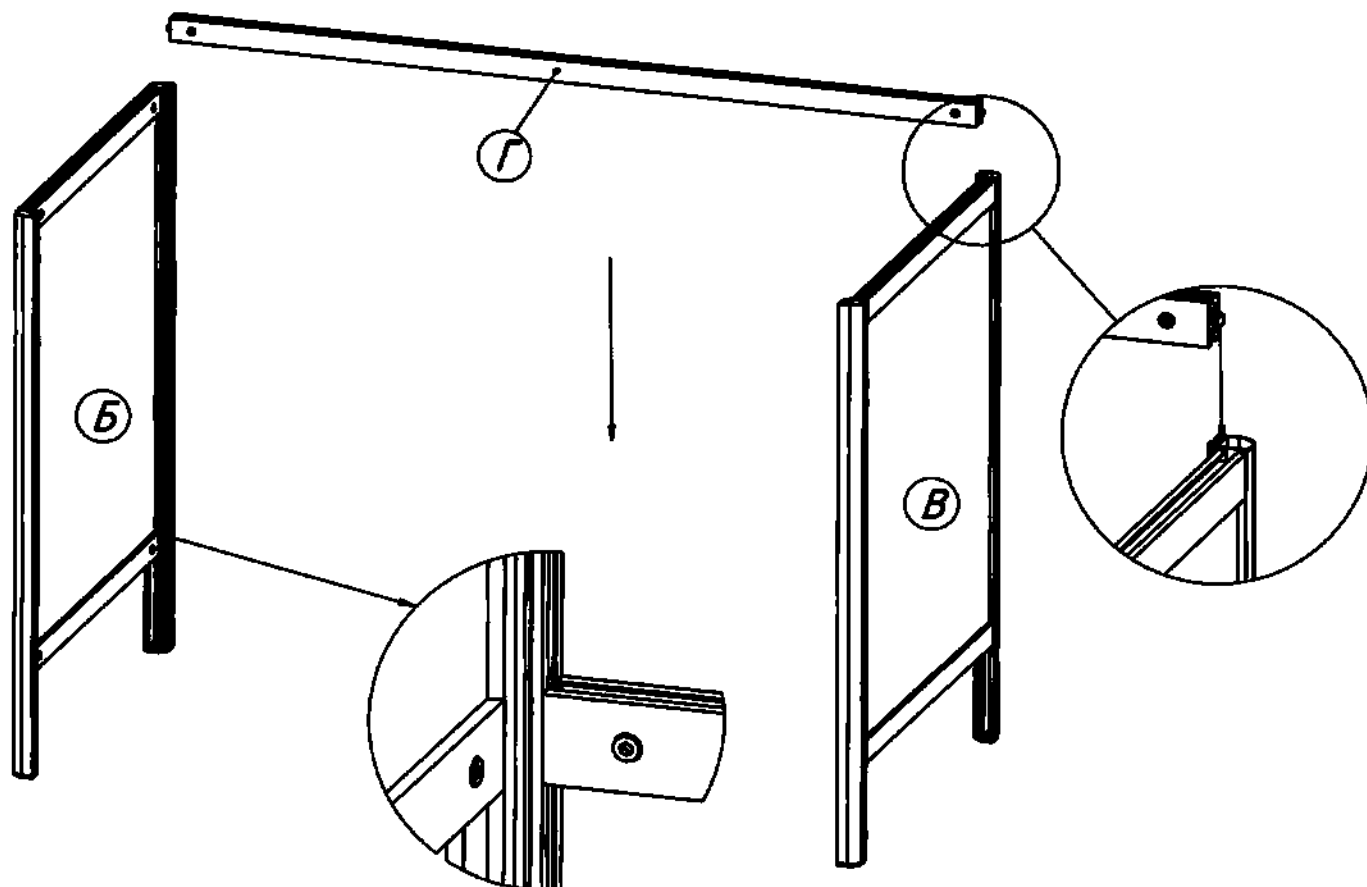


ОМ 29.768.02

5 этап

Произведите установку прогона верхнего переднего (Е) таким образом, чтобы винты замков прогона (Е) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона (Е), тем самым зафиксировав его на стенках.


Ех1 шт.

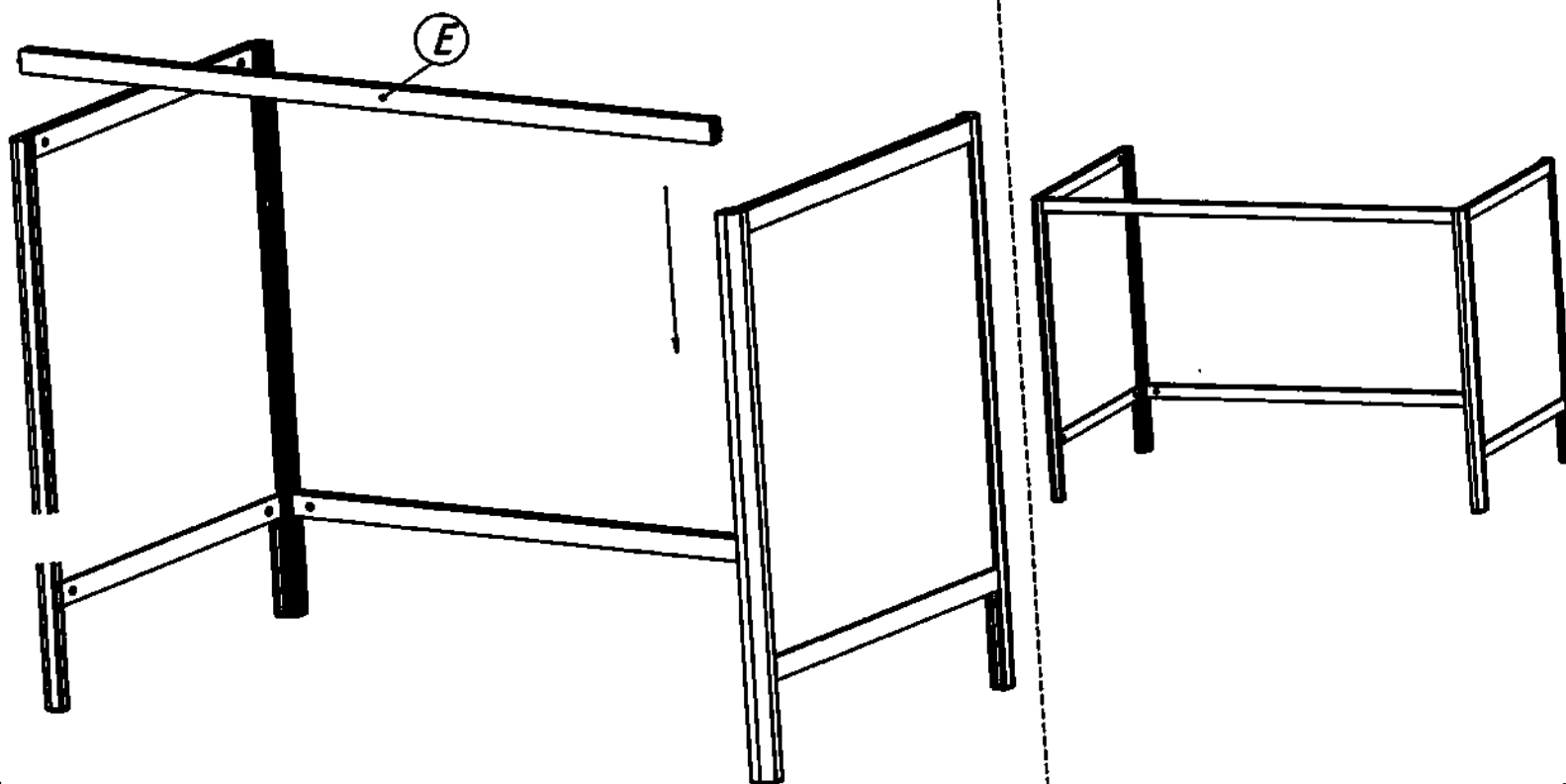

Произведите установку стенки задней (Ж) и прогона заднего нижнего (Г).
Далее затяните винты замков прогона.

Гх1 шт.
Жх1 шт.



6 этап

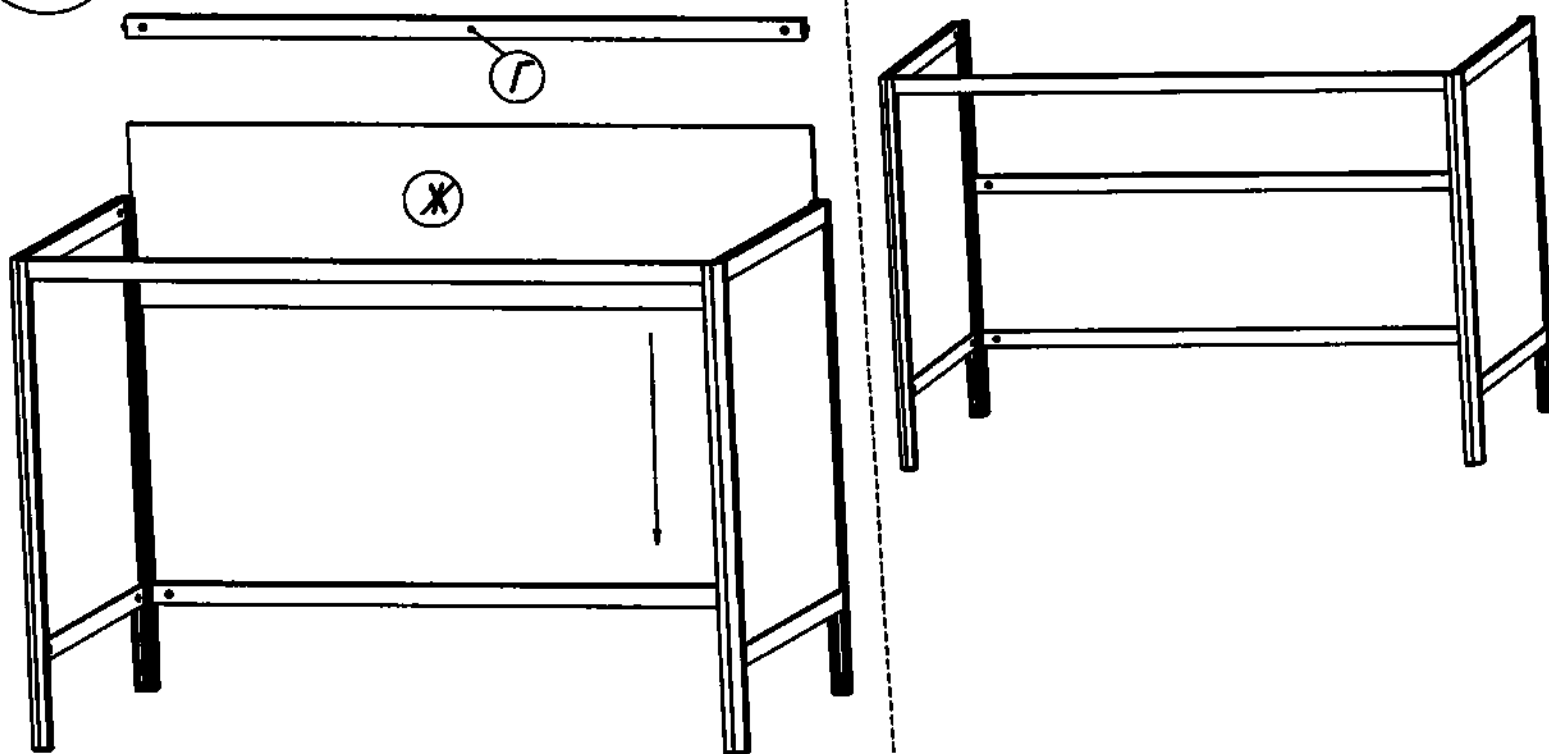

Жх1 шт.

ОМ 29.768.02 Произведите установку стенки задней (Ж)



7 этап

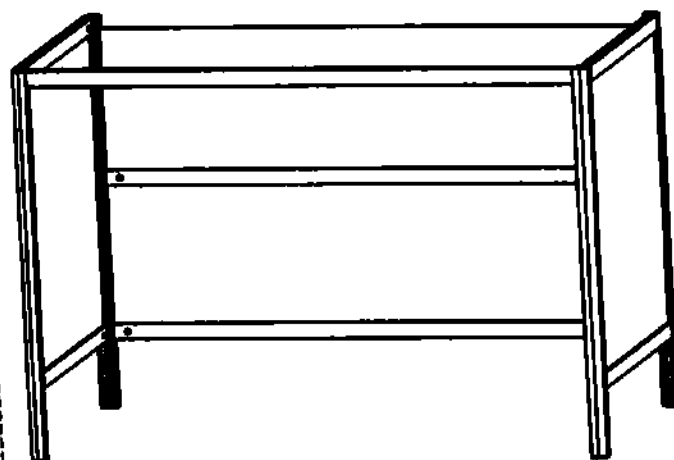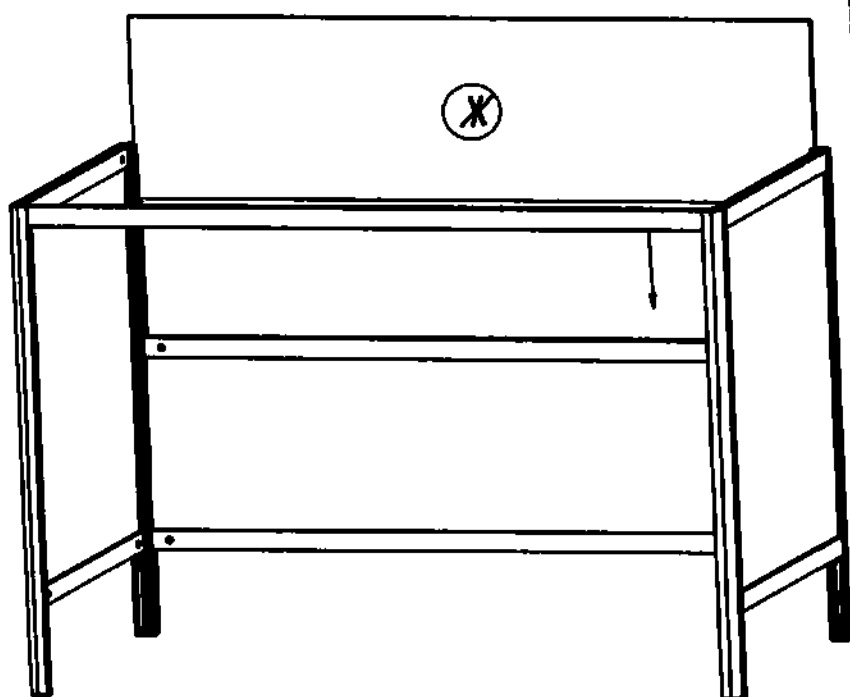

Произведите установку прогона верхнего заднего (Д) таким образом, чтобы винты замков прогона (Д) находились с внутренней стороны конструкции. Далее затяните винты замков прогона, тем самым зафиксировав его на стенках.

Дх1 шт.


8 этап

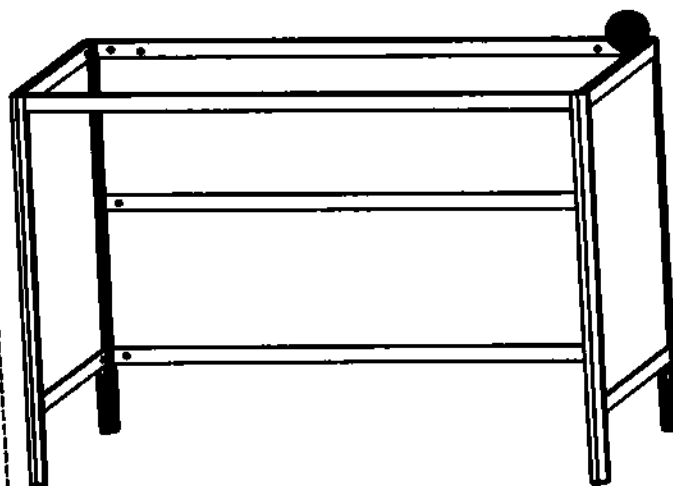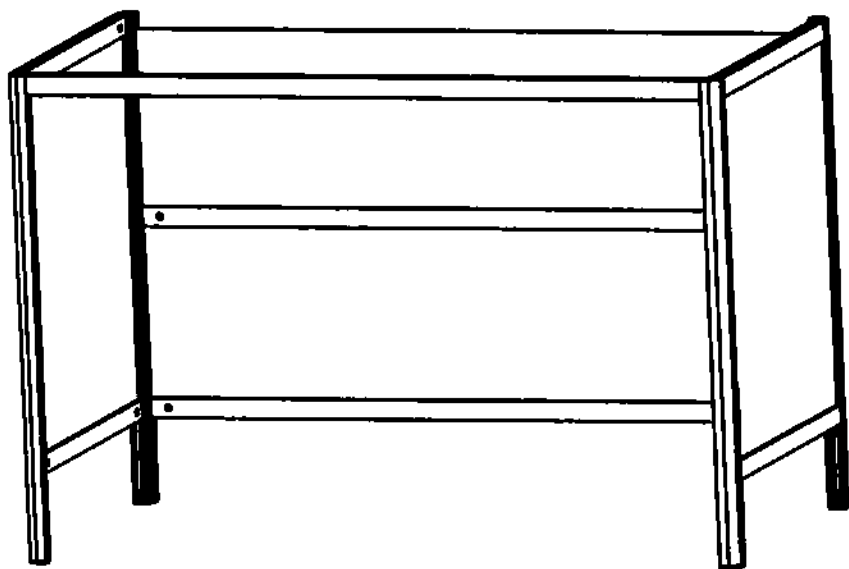

ОМ 29.768.02 Произведите сборку столешницы

9 этап




Ах1 шт.
2х4 шт.
1х4 шт.

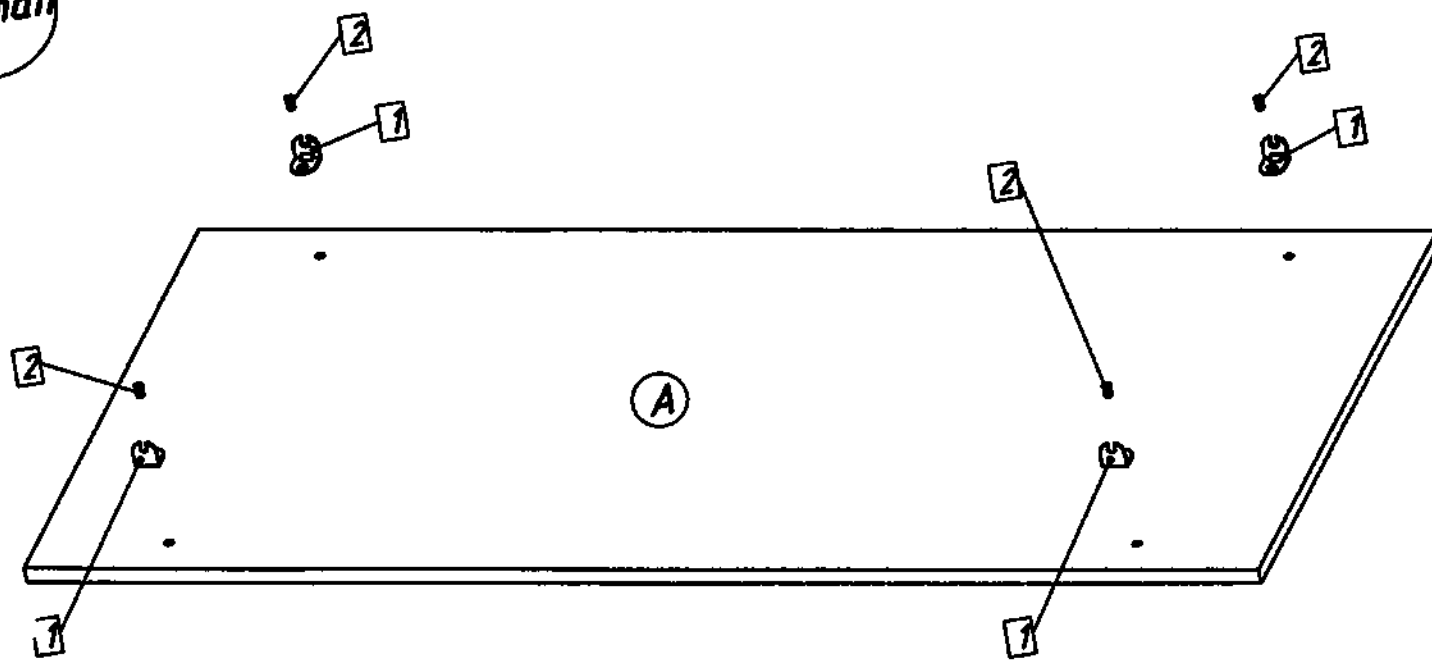

ОМ 29.768.02 Произведите установку ранее собранного каркаса тумбочки на столешницу, перевернув каркас на 180 градусов

Ах1 шт.

10 этап

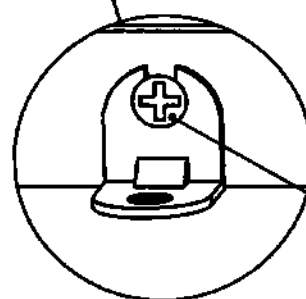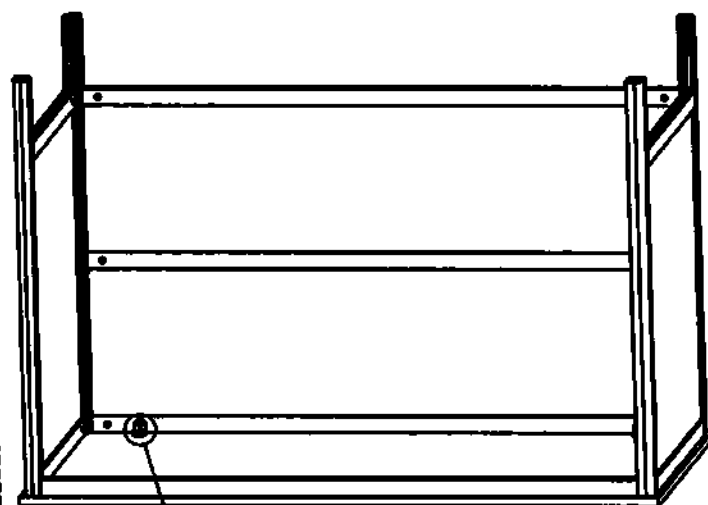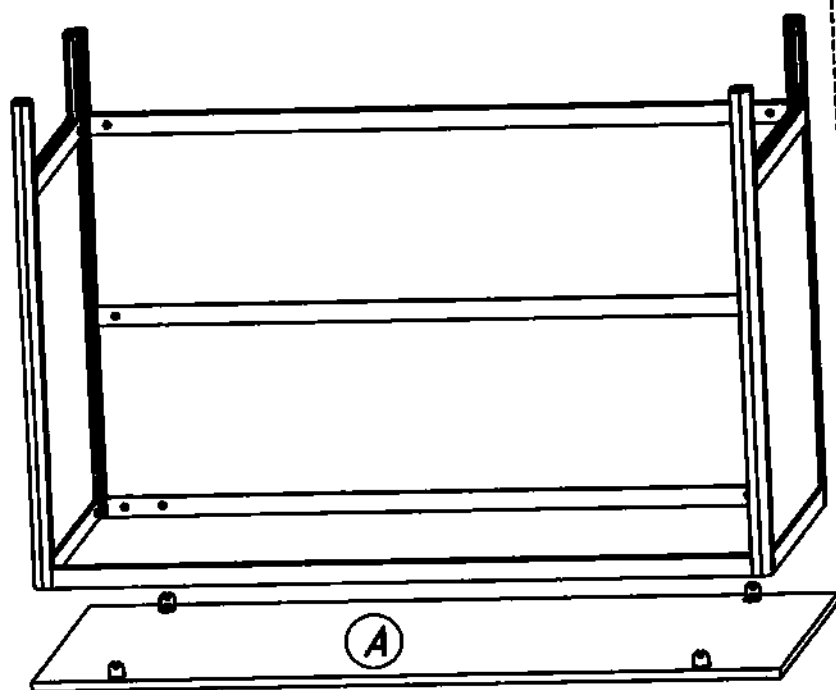


Затяните четыре винта в уголках для фиксации столешницы.

Произведите установку опор, вкручивая их по часовой стрелке. Установите заглушки декоративные.

5х4 шт.
4х6 шт.

11 этап

Опоры 5 следует закручивать рожковым ключом 10 по часовой стрелке, либо плоскогубцами.
ВНИМАНИЕ:
Рожковый ключ 10, плоскогубцы не входят в комплект поставки изделия

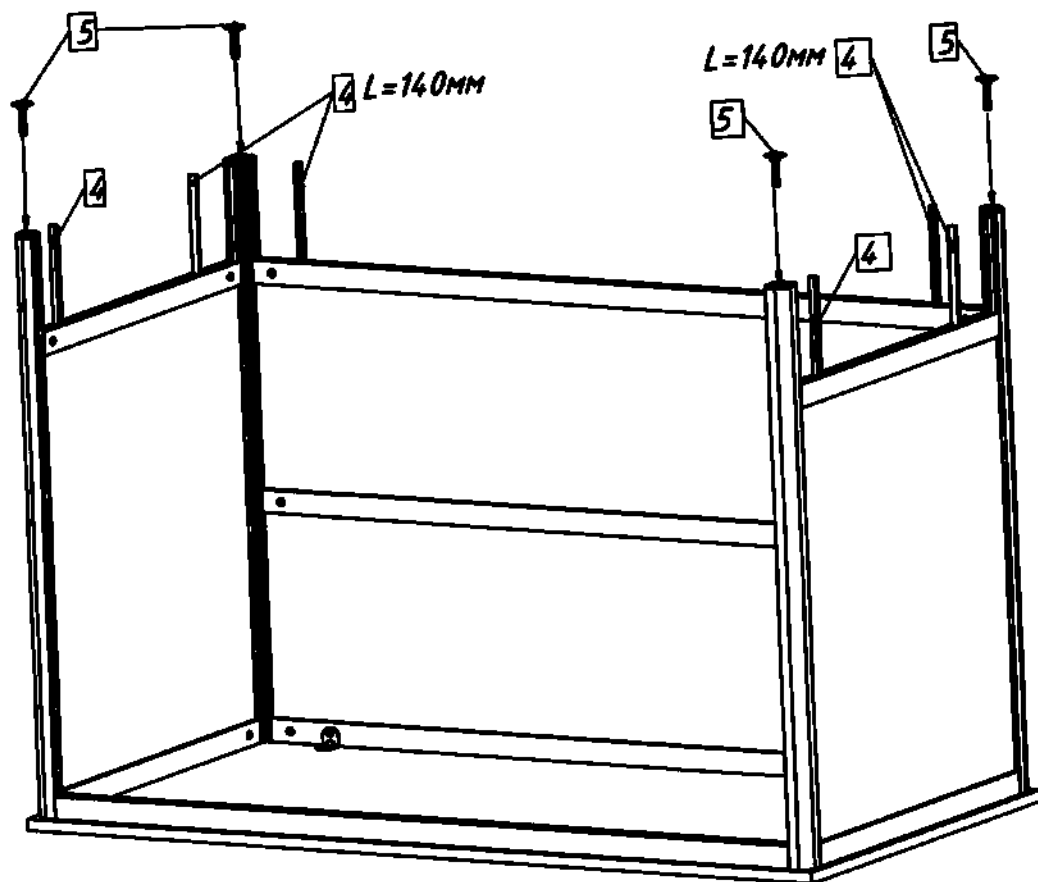

После установки опор переверните изделие и поставьте его на ножки.



Заявка на изготовление медицинских изделий (мод. 3)

ОМ 29.768.02


Наклейте самоклеящийся логотип компании

6х1 шт.

12 этап

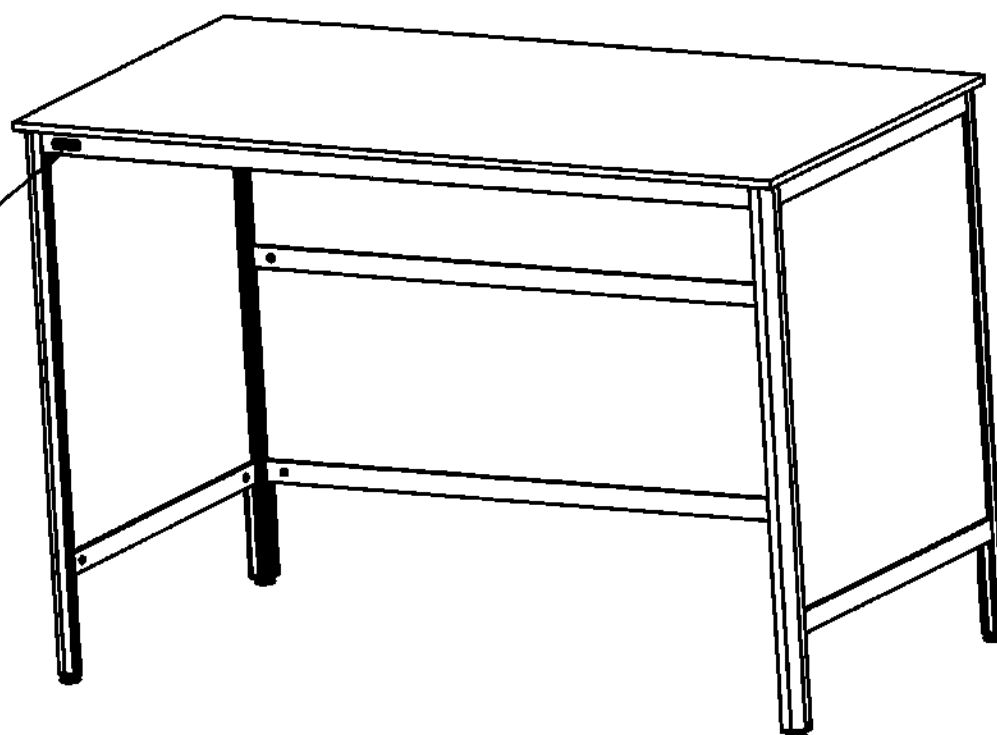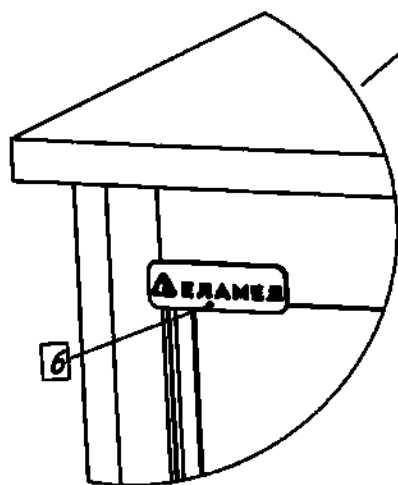

Сборка изделия завершена

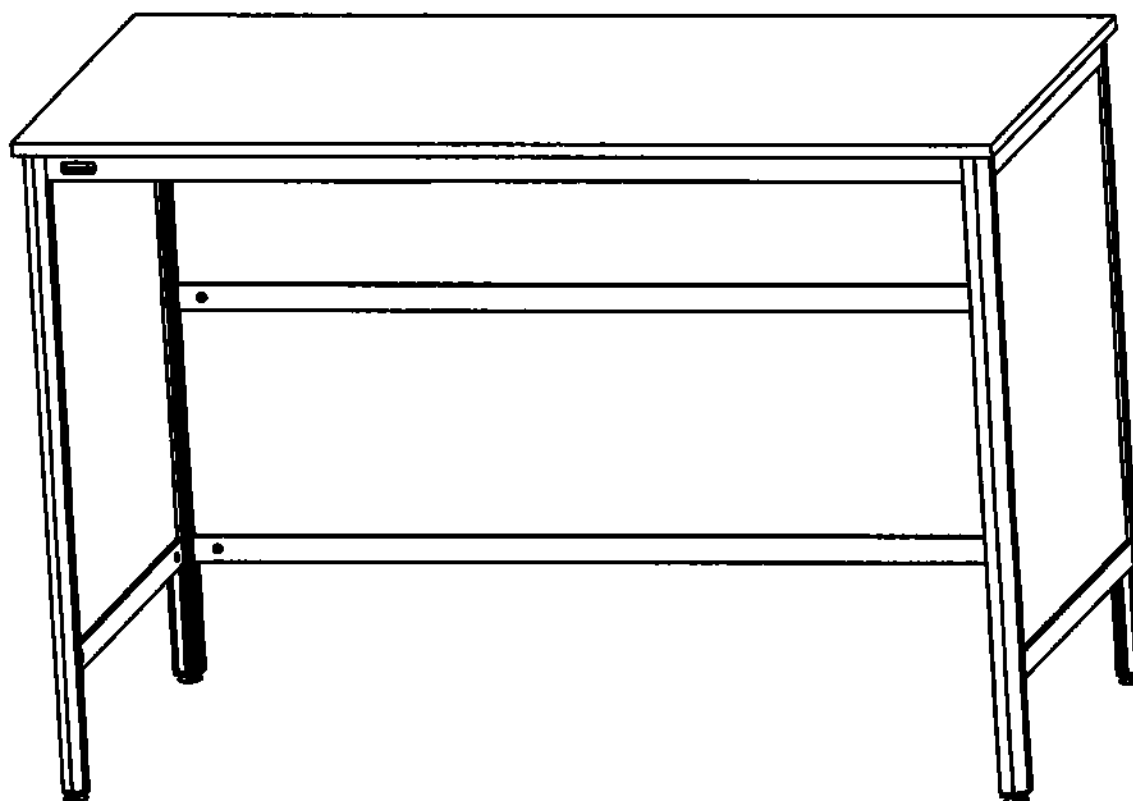

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 73 листа(ов).

Директор проектного офиса АО «ЕПЗ»

Крешкин М.В.

20 24



EPLAMED

Утверждаю

Директор проектного офиса

Крошкин М.В.

«18» ноября 2024



Руководства по эксплуатации медицинского изделия

«Столы медицинские по ГИКС.942810.114ТУ»


11. Свидетельство о приемке
Сведения указаны в таблице 2.
Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицин- ских изделий (мод. 1)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____
Штамп ОТК _____
Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Ленина, 25
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: ipr@elamed.com
Сайт компании: ipr.elamed.com
Регистрационное удостоверение

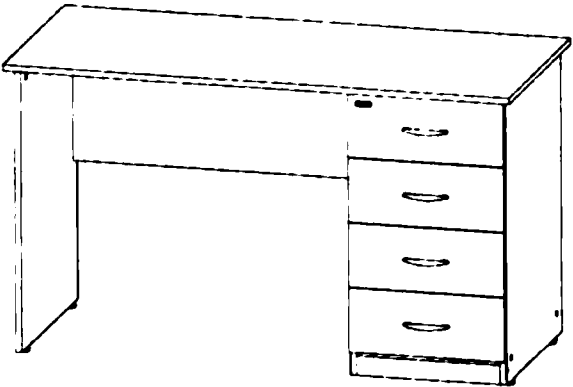

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ
СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.209 РЗ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 1) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! **Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости регулируйте высоту опор.**

! **При значительной нагрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания стола!**

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков!**

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы и ящиков выше установленных норм!**

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 40,4 ± 4,0 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1300×600×756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на дно из плиты древесно-волоконной ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвигании.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при +25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. Справа в стол встроена тумба с четырьмя выдвижными ящиками. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волоконной. Стол устанавливается на шесть мебельных ножек с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 1)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 1) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Стенка средняя	1 шт.
Основание тумбы	1 шт.
Стенка задняя тумбы	1 шт.
Царга	1 шт.
Фасад выдвижного ящика	4 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	4 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	4 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	4 шт.
Дно выдвижного ящика	4 шт.
Конфирмат	26 шт.
Заглушка конфирмата	10 шт.
Шкант мебельный	38 шт.
Эксцентрик	14 шт.
Шток эксцентрика	14 шт.
Заглушка эксцентрика	14 шт.
Гвоздь 1,6×25	20 шт.
Направляющие	4 комплекта
Саморез 3,5×13	48 шт.
Ручка мебельная	4 комплекта

Наименование	Количество
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Опора стола	6 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1% раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь в ближайший сервисный центр, указанный во вкладыше, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Космодемьянский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

1. Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвигание ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвигении, выполняют свое функциональное назначение;
- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты утаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде жидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Соответствие в приложении
Сведения указаны в таблице 2.
Таблица 2

Столы медицинские ГИКС 942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____


Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Ленина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: info@elamed.com
Сайт компании: ru.elamed.com

Регистрационное удостоверение

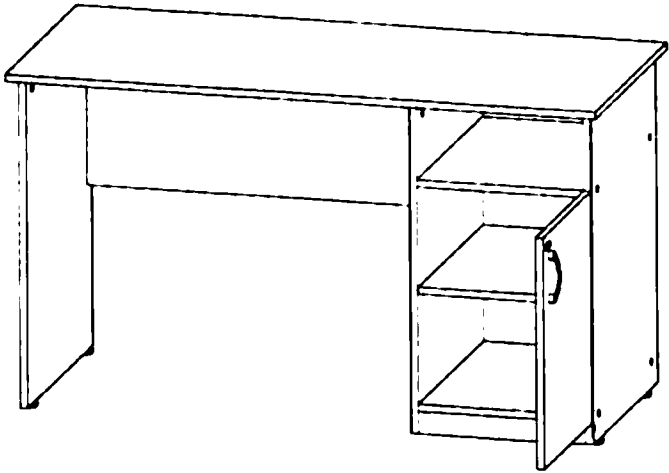

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 2)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.211 РЭ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораторных) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораторных) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораторных лечебно-профилактических учреждениях.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! **Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.**

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытой двери!**

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы и полки выше установленных норм!**

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 33,6 ± 3,4 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1300×600×756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью выкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3. Зазоры в проемах на сторону для двери не более 4 мм. Дверь стола открывается и закрывается с усилием не более 30 Н. Угол открывания двери стола не менее 90°.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С, номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. В стол встроена тумба в виде ящика с двумя полками, одна из которых съемная. Полки делят тумбу на три секции. Две нижние секции закрыты дверцей. Стол устанавливается на шесть мебельных ножек с возможностью регулировки по высоте. Стол собирается в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 2) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Стенка средняя	1 шт.
Основание тумбы	1 шт.
Полка тумбы	1 шт.
Стенка задняя тумбы	1 шт.
Царга	1 шт.
Дверь	1 шт.
Полка тумбы съемная	1 шт.
Конфирмат	14 шт.
Заглушка конфирмата	14 шт.
Шкант мебельный	18 шт.
Эксцентрик	6 шт.
Шток эксцентрика	6 шт.
Заглушка эксцентрика	6 шт.
Гвоздь 1,6×25	20 шт.
Петли накладная, монтажная планка	2 комплекта
Саморез 4×16	8 шт.
Ручка мебельная	1 комплект
Полкодержатель	4 шт.
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.

Наименование	Количество
Опора стола	6 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.

Примечание - Фасад двери может быть изготовлен в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется в виде закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления самовлета в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратиться в ближайший сервисный центр, указанный во вкладке, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатына, ул. Янина, 25, АО «Елатинский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- подливать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеуказанных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) проверки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) проверки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путем протирания мягкой, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путем протирания мягкой, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с первичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде экологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».


11. Свидетельство о приеме
Сведения указаны в таблице 2.
Таблица 2

Столы медицинские ГИКС 942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицин- ских изделий (мод. 3)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС 942810.114ТУ и признам годным для эксплуатации.

№ партии _____
Штамп ОТК _____
Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Грязинская область,
Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Ленина, 25
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: info@elamed.com
Сайт компании: www.elamed.com
Регистрационное удостоверение

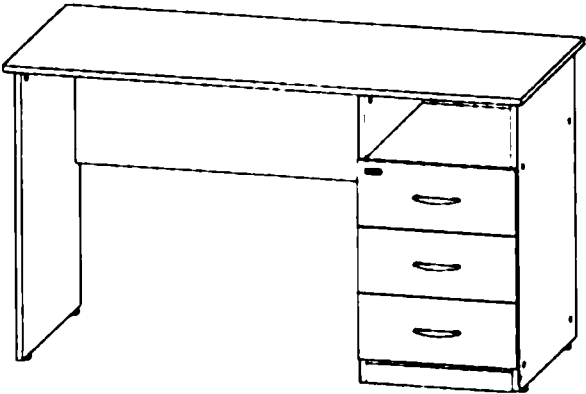

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ
СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 3)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.212 РЗ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 3) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораторных) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораторных) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! **Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.**

! **При значительной нагрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания стола!**

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков!**

! **ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы, ящиков и полок выше установленных норм!**

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 39,5 ± 4,0 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1300×600×756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвигании.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при +25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. Стол оснащен встроенной тумбой с тремя выдвижными ящиками. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Под столешницей расположена ниша. Стол устанавливается на шесть мебельных ножек с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 3)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 3) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Стенка средняя	1 шт.
Основание тумбы	1 шт.
Полка тумбы	1 шт.
Стенка задняя тумбы	1 шт.
Царга	1 шт.
Фасад выдвижного ящика	3 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	3 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	3 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	3 шт.
Дно выдвижного ящика	3 шт.
Конфирмат	26 шт.
Заглушка конфирмата	14 шт.
Шкант мебельный	36 шт.
Эксцентрик	12 шт.
Шток эксцентрика	12 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.
Гвоздь 1,6×25	20 шт.
Направляющие	3 комплекта
Саморез 3,5×12	36 шт.

Наименование	Количество
Ручка мебельная	3 комплекта
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Опора стола	6 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь в ближайший сервисный центр, указанный во вкладыше, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Яяна, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвигание ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвигании, выполняют свое функциональное назначение;
- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеназванных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты утилизации.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путем протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей стола путем протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде жизнедеятельно безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

ОМ 29.1225.01 от 19.04.2024 г.
стипа со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. *Свидетельство о приемке*

Сведения указаны в таблице 2.

Таблица 2

Столы медицинские ГИКС 942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 4)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елампольский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Ивановская область,

Касимовский район, р.п. Еламполь, ул. Липина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: ipm@elamed.com

Сайт компании: ipm.elamed.com



Регистрационное удостоверение

ОМ 29.1225.01 от 19.04.2024 г.

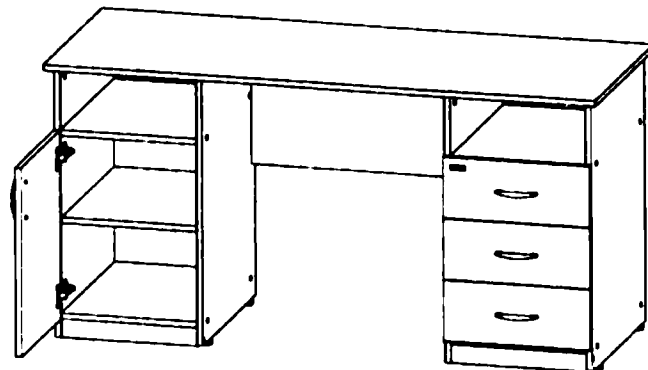

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 4)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.213 РЭ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 4) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потребительские требования – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинской и научной персоналы при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.

! При значительной нагрузке ящики не следует выдвигать полностью, необходимо придерживаться линии стопки для предотвращения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на внешние грани выдвинутых ящиков и открытой двери!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы, ящиков и панелей в месте установленных ножек!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 53,9 ± 5,4 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм: (1500*600*756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвигании. Зазоры в проемах на сторону для двери не более 4 мм. Дверь стола открывается и закрывается с усилием не более 30 Н. Угол открывания двери стола не менее 90°.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при +25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. По бокам стола расположены две встроенные тумбы. Левая тумба – в виде ящика с двумя полками, одна из которых съемная, делением тумбу на три секции. Две нижние секции закрыты дверцей. Правая тумба – с тремя выдвижными ящиками. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Справа под столешницей расположена ниша. Стол устанавливается на восемь мебельных ножек с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплектация:

Сведения указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 4)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 4) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Стенка средняя левая	1 шт.
Стенка средняя правая	1 шт.
Основание тумбы	2 шт.
Полка тумбы	2 шт.
Стенка задняя левой тумбы	1 шт.
Стенка задняя правой тумбы	1 шт.
Царга	2 шт.
Фасад выдвижного ящика	3 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	3 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	3 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	3 шт.
Дно выдвижного ящика	3 шт.
Дверь	1 шт.
Полка тумбы съемная	1 шт.
Конфирмат	36 шт.
Защелка складывающаяся	24 шт.

Защелка складывающаяся

Наименование	Количество
Шкант мебельный	46 шт.
Эксцентрик	14 шт.
Шток эксцентрика	14 шт.
Заглушка эксцентрика	14 шт.
Гвоздь 1,6*25	40 шт.
Направляющие	3 комплекта
Саморез 3,5*13	36 шт.
Ручка мебельная	4 комплекта
Петли накладная, монтажная планка	2 комплекта
Саморез 4*16	8 шт.
Полкодержатель	4 шт.
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Опора стола	8 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады двери и ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от - 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре +25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от - 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь в ближайший сервисный центр, указанный во вложении, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25, АО «Елатмский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвигание ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвигании, выполняют свое функциональное назначение;

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:
- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеуказанных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
б) протирки винтов ручек ящиков и двери не реже одного раза в месяц;
в) протирки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
г) очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путем протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
д) дезинфекцию поверхности стола путем протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответ-

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицин- ских изделий (мод. 5)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	


изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____
Штамп ОТК _____
Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com



Регистрационное удостоверение

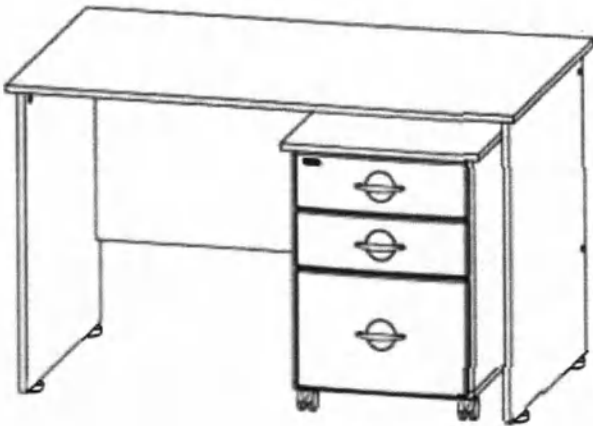

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ
СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 5)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942819.117 РЭ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 5) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показатели к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений. Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и последовательных учреждений и организаций (медицинской и научной персона) при осуществлении или профессиональной деятельности. Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.
! При значительной нагрузке ящики не следует выдвигать полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предотвращения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и наваливаться на вершине ящика выдвинутых ящиков!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы и ящиков выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 49,0 ± 4,9 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: (1200 × 710 × 737) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Нормальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвигании.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. Справа (слева) расположена выкатная тумба с тремя выдвижными ящиками с пластиковыми фасадами. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Стол устанавливается на мебельные ножки с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 5)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 5) - 1 шт., в составе:	
Стенка тумбы левая	1 шт.
Стенка тумбы правая	1 шт.
Столешница тумбы	1 шт.
Дно тумбы	1 шт.
Стенка задняя тумбы	1 шт.
Задняя стенка ящика	3 шт.
Правая стенка ящика	3 шт.
Левая стенка ящика	3 шт.
Дно ящика	3 шт.
Большой фасад ящика	1 шт.
Малый фасад ящика	2 шт.
Стенка большого фасада ящика	1 шт.
Стенка малого фасада ящика	2 шт.
Столешница	1 шт.
Задняя стенка стола	1 шт.
Левая стенка стола	1 шт.
Правая стенка стола	1 шт.
Еврошпнт	32 шт.
Заглушка еврошпнта	4 шт.
Шкант мебельный	24 шт.
Опора стола	4 шт.
Опора колесная	4 шт.
Саморез 4x16	16 шт.
Ручка мебельная	3 шт.
	6 шт.

Наименование	Количество
Гвоздь 1,6x25	20 шт.
Саморез 4x12	24 шт.
Заглушка самоклеящаяся	30 шт.
Эксцентрик	8 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Заглушка эксцентрика	4 шт.
Направляющие	3 комплекта
Саморез 3,5x13	30 шт.
Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
Логотип компании	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкции по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от - 50 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя - в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от - 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамин по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь в ближайший сервисный центр, указанный во вкладыше, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатмы, ул. Янина, 25, АО «Елатмский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверить следующее:

- выдвигание ящиков осуществляется без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвигании, выполняют свое функциональное назначение;

- крепёжные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление парания на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

- а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
- б) протирки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
- в) протирки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендуемой СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке
Сведения представлены в таблице 2.
Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицин- ских изделий (мод. 6)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ
СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 6)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.108-04 РЭ

ОМ 29.1229.01 от 19.04.2024 г.

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 6) (в дальнейшем – стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Назначение и применение: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные негативные воздействия – работников медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинской и научной персонал при осуществлении или профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

1 Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор.

1 При значительной нагрузке ящики не следует выдвигать ящики полностью, необходимо придерживать ящики снизу для предупреждения опрокидывания стола!

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оплохотываться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков!

1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ надругаться рабочи поверхностями столешницы и ящиков выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 77,7 ± 7,7 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1600×710×737) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвижения ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвижении.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из ЛДСП. По бокам стола расположены две выкатные тумбы. Каждая тумба состоит из трех выдвижных ящиков с пластиковыми фасадами. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Стол устанавливается на мебельные ножки с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 6)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 6) - 1 шт., в составе:	
Стенка тумбы левая	2 шт.
Стенка тумбы правая	2 шт.
Крышка тумбы	2 шт.
Дно тумбы	2 шт.
Стенка задняя тумбы	2 шт.
Задняя стенка ящика	6 шт.
Правая стенка ящика	6 шт.
Левая стенка ящика	6 шт.
Дно ящика	6 шт.
Фасад ящика большого	2 шт.
Фасад ящика малого	4 шт.
Стенка большого ящика	2 шт.
Стенка малого ящика	4 шт.
Столешница	1 шт.
Задняя стенка стола	1 шт.
Левая стенка стола	1 шт.
Правая стенка стола	1 шт.
Саморез 3,5×13	60 шт.
Саморез 4×12	48 шт.
Саморез 3,5×19	32 шт.
Заглушка для евроингта	4 шт.
Винт М4х25	12 шт.
	14 шт.

ОМ 29.1229.01 от 19.04.2024 г.

Наименование	Количество
Шток эксцентрика	14 шт.
Заглушка эксцентрика	6 шт.
Ручка мебельная	6 шт.
Заглушка самоклеящаяся	60 шт.
Шкант	36 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Евроингт	60 шт.
Направляющие	6 комплекта
Гвоздь 1,6×25	40 шт.
Опора конусная	8 шт.
Опора стола	4 шт.
Логотип компании	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкции по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре + 25°С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1% раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратиться в ближайший сервисный центр, указанный во вкладыше, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатыма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;

- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;

- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение;

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) протирки винтов ручек ящиков и двери не реже одного раза в месяц;

в) протирки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде экологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме
Сведения представлены в таблице 2.
Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицин- ских изделий (мод. 7)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114 ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____


Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД
Исполнитель:
АО «Екатеринбургский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатола, ул. Ленина, 25



Тел./факс: (49131) 2-04-57
Телефон бесплатной горячей линии: 8 800 350-06-13
E-mail: info@elamed.com
Сайт: ru.elamed.com

Регистрационное удостоверение

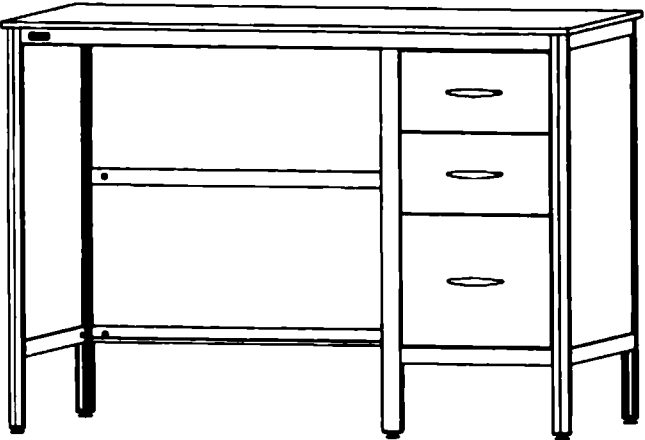

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 7)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.217 РЭ

ОМ 29.1238.01 от 19.04.2024 г.

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 7) (в дальнейшем - стол) предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показания к применению: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор!

! При значительной нагрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предотвращения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облакачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы и ящиков выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 31,2 ± 3,1 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1200×619×848) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвигании.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, стенки заполнены сэндвич-панелью. Стол имеет встроенную тумбу с тремя выдвижными ящиками из влагостойкой ЛДСП. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Стол комплектуется столешницей из влагостойкой ЛДСП. Стол устанавливается на пять мебельных ножек, регулируемых по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 7)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 7) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Прогон нижний передний	1 шт.
Прогон нижний задний	1 шт.
Стойка передняя	1 шт.
Стойка задняя	1 шт.
Стенка задняя левая	2 шт.
Стенка задняя правая	1 шт.
Прогон задний левый	1 шт.
Прогон верхний задний левый	1 шт.
Прогон верхний задний правый	1 шт.
Перегородка	1 шт.
Прогон верхний передний	1 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	2 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	2 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	2 шт.
Панель выдвижного ящика	3 шт.
Дно выдвижного ящика	3 шт.
Фасад выдвижного ящика	2 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	1 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	1 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	1 шт.
Фасад выдвижного ящика	1 шт.
Уголок мебельный	4 шт.
Евроинт 6,3×13	4 шт.
	18 шт.

ОМ 29.1238.01 от 19.04.2024 г.

Наименование	Количество
Опора стола	5 шт.
Логотип компании	1 шт.
Саморез 3×20	6 шт.
Площадка под направляющие	6 шт.
Саморез 3×12	30 шт.
Направляющие	3 комплекта
Шкант мебельный	18 шт.
Ручка мебельная	3 комплекта
Заглушка декоративная	1 шт.
Шток эксцентрика	6 шт.
Эксцентрик	6 шт.
Заглушка эксцентрика	6 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкции по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатэма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвигание ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвигании, выполняют свое функциональное назначение;
- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

- Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:
- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

ОМ 29.1240.01 от 19.04.2024г.

- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Сведения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 8)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс: (49131) 2-04-57

Телефон бесплатной горячей линии: 8 800 350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com


Сайт: lpu.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение

ОМ 29.1240.01 от 19.04.2024г.

ЕЛАМЕД

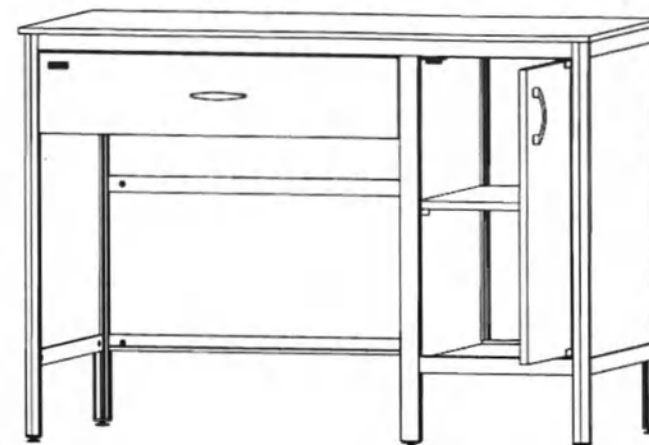

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 8)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.218 РЗ

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 8) (в дальнейшем – стол), предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Помещение и хранение: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребности – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении или профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор!
! При значительной нагрузке ящика не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предотвращения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и опираться на верхние грани выдвинутого ящика и открытой двери!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать рабочие поверхности столешницы, ящика и полки выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 30,5 ± 3,1 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм: (1200×619×848) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты, ламинированной древесностружечной – 15 кг;

- на дно из плиты древесно-волоконистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящик имеет устройство для предотвращения выпадения при выдвигании. Зазоры в проемах на сторону для двери не более 4 мм. Дверь стола открывается и закрывается с усилием не более 30 Н. Угол открытия двери стола не менее 90°.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; относительная влажность 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, стенки заполнены сэндвич-панелью. Стол имеет встроенную тумбу с двумя съёмными полками из влагостойкой ЛДСП, из которых верхняя полка регулируется по высоте установки. Нижняя полка является дном тумбы. Тумба закрывается дверью из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитом. Стол комплектуется столешницей из влагостойкой ЛДСП. Под столешницей между тумбой и боковой стенкой расположен выдвигающий ящик из влагостойкой ЛДСП. Стол устанавливается на пять мебельных ножек, регулируемых по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 8)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 8) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Прогон нижний передний	1 шт.
Прогон нижний задний	1 шт.
Стойка передняя	1 шт.
Стойка задняя	1 шт.
Стенка задняя левая	2 шт.
Стенка задняя правая	1 шт.
Прогон задний левый	1 шт.
Прогон верхний задний левый	1 шт.
Перегородка	1 шт.
Прогон верхний передний	1 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	1 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	1 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	1 шт.
Панель выдвижного ящика	1 шт.
Дно выдвижного ящика	1 шт.
Фасад выдвижного ящика	1 шт.
Дверь	1 шт.
Заглушка прогона нижнего	1 шт.
Заглушка прогона верхнего	1 шт.
000 ЦИРМИ	1 шт.

Наименование	Количество
Полка нижняя	1 шт.
Прогон задний правый	1 шт.
Прогон перегородки	1 шт.
Перегородка нижняя	1 шт.
Уголок мебельный	4 шт.
Евровинт 6,3×13	4 шт.
Ковфитмент	6 шт.
Опора стола	5 шт.
Полкодержатель	4 шт.
Саморез 3×20	4 шт.
Плошадка под направляющие	2 шт.
Саморез 3×12	14 шт.
Направляющие	1 комплект
Шкант мебельный	6 шт.
Ручка мебельная	2 комплекта
Заглушка декоративная	1 шт.
Шток эксцентрика	2 шт.
Эксцентрик	2 шт.
Заглушка эксцентрика	2 шт.
Защелка магнитная	1 шт.
Плошадка магнита	1 шт.
Петля для дверей из ЛДСП	1 комплект
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящика и двери могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвигание ящика обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящика относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящика из корпуса при его выдвигании, выполняют свое функциональное назначение;

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем эксплуатационных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов ручки ящика и двери не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
 - очистку от загрязнений поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

ОМ 29.1242.01 от 14.03.2024 г.

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приемке

Сведения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 9)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс: (49131) 2-04-57

Телефон бесплатной горячей линии: 8 800 350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт: lpu.elamed.com



Регистрационное удостоверение

ОМ 29.1242.01 от 14.03.2024 г.



СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 9)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.219 РЭ

ОМ 29.1242.01 от 14.03.2024 г.

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 9) (в дальнейшем – стол), предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Показатели и требования: применяются в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений. Протезирование: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении ими профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор!

! При значительной нагрузке ящики не следует выдвигать ящик полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предупреждения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ оплохачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать рабочие поверхности столешницы и ящиков выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 38,4 ± 3,8 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина×ширина×высота) мм: (1200×619×848) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвигания ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвигании.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории

4.2: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при +25 °С.

2.6 Стол изготовлен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, стенки выполнены сэндвич-панелью. Стол имеет встроенную тумбу с тремя выдвижными ящиками из влагостойкой ЛДСП. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Стол комплектуется столешницей из влагостойкой ЛДСП. Под столешницей между тумбой и боковой стенкой расположен выдвижной ящик из влагостойкой ЛДСП. Стол устанавливается на пять мебельных ножек, регулируемых по высоте. Стол собирается в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 9)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 9) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Прогон нижний передний	1 шт.
Прогон нижний задний	1 шт.
Стойка передняя	1 шт.
Стойка задняя	1 шт.
Стенка задняя левая	2 шт.
Стенка задняя правая	1 шт.
Прогон задний левый	1 шт.
Прогон верхний задний левый	1 шт.
Прогон задний правый	1 шт.
Прогон верхний передний	1 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	2 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	3 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	3 шт.
Панель выдвижного ящика	3 шт.
Дно выдвижного ящика	3 шт.
Фасад выдвижного ящика	2 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика нижнего	1 шт.
Стенка левая выдвижного ящика нижнего	1 шт.
Стенка правая выдвижного ящика нижнего	1 шт.
Фасад выдвижного ящика нижнего	1 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика левого	1 шт.
Панель выдвижного ящика левого	1 шт.
	1 шт.

ОМ 29.1242.01 от 14.03.2024 г.

Наименование	Количество
Фасад выдвижного ящика левого	1 шт.
Перегородка	1 шт.
Уголок мебельный	4 шт.
Евроинт 6,3×13	4 шт.
Конфирмат	24 шт.
Опора стола	5 шт.
Саморез 3×20	8 шт.
Панелька под направляющие	8 шт.
Саморез 3×12	40 шт.
Направляющие	4 комплекта
Шкант мебельный	24 шт.
Ручка мебельная	4 комплекта
Заглушка декоративная	1 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Эксцентрик	8 шт.
Заглушка эксцентрика	8 шт.
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.

Примечание - Фасады ящиков могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от - 50 °С до + 50 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3. Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от - 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическими методами по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составляющих частей стола обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение;

- крепёжные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

- Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:
- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление паралича на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеуказанных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:
- а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;
- б) протяжки винтов ручек ящиков не реже одного раза в месяц;
- в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утверждённым внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещении которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

ОМ 29.1244.01 от 19.04.2024 г.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручек ящиков и двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство о приеме

Сведения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Столы медицинские ГИКС.942810.114ТУ	Примечание	Код
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 10)	☐ Цвет белый	
	☐ Цвет желтый	
	☐ Цвет оранжевый	
	☐ Цвет зеленый	
	☐ Цвет синий	
	☐ Цвет фиолетовый	

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

ЕЛАМЕД

Тел./факс: (49131) 2-04-57

Телефон бесплатной горячей линии: 8 800 350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Сайт: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ОМ 29.1244.01 от 19.04.2024 г.

ЕЛАМЕД

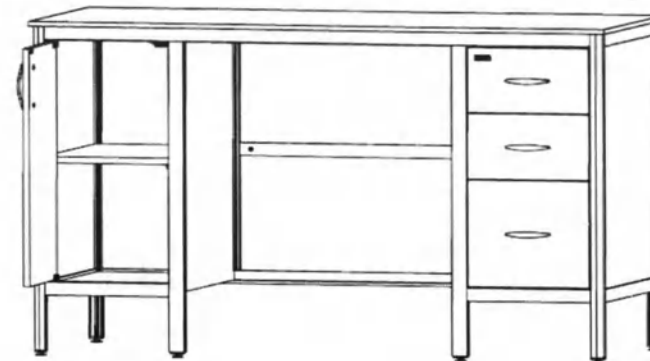

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 10)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.220 РЭ

ОМ 29.1244.01 от 19.04.2024 г.

Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 10) (в дальнейшем – стол), предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий, с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Назначение и применение: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потребительские требования – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении или профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор!

! При значительной нагрузке ящики не следует выдвигать полностью, необходимо придерживать ящик снизу для предотвращения опрокидывания стола!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков и открытой двери!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать рабочие поверхности столешницы, ящиков и полок выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 42,0 ± 4,2 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: (1500 × 619 × 848) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг;

- на дно из плиты древесно-волокнистой ящика – 10 кг.

2.3 Усилие выдвижения ящика не превышает 50 Н. Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения при выдвижении. Зазоры в проемах на сторону для двери не более 4 мм. Дверь стола открывается и закрывается с усилием не более 30 Н. Угол открывания двери стола не менее 90°.

2.4 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; максимальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.6 Стол изготовлен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием, стенки заполнены сэндвич-панелью. По бокам стола расположены две астрономические тумбы. Левая тумба имеет две съёмные полки из влагостойкой ЛДСП, из которых верхняя полка регулируется по высоте установки, нижняя полка является дном тумбы. Тумба закрывается дверью из влагостойкой ЛДСП с фиксацией магнитом. Правая тумба – с тремя выдвижными ящиками из влагостойкой ЛДСП. Дно ящиков изготовлено из плиты древесно-волокнистой. Стол комплектуется столешницей из влагостойкой ЛДСП. Стол устанавливается на шесть мебельных ножек, регулируемых по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 10)	
1 Стол для размещения и хранения медицинских изделий (мод. 10) – 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Прогон нижний левый передний	1 шт.
Прогон нижний задний	1 шт.
Стойка передняя левая	1 шт.
Стойка задняя левая	1 шт.
Стенка задняя средняя	2 шт.
Стенка задняя	2 шт.
Прогон задний средний	2 шт.
Прогон задний левый	1 шт.
Перегородка	1 шт.
Перегородка верхняя	1 шт.
Прогон верхний передний	1 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	2 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	2 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	2 шт.
Панель выдвижного ящика	3 шт.
Дно выдвижного ящика	3 шт.
Фасад выдвижного ящика	2 шт.
Панель	1 шт.
	1 шт.

ОМ 29.1244.01 от 19.04.2024 г.

Наименование	Количество
Заглушка прогона верхнего	1 шт.
Полка верхняя	1 шт.
Полка нижняя	1 шт.
Прогон задний правый	1 шт.
Стойка передняя правая	1 шт.
Стойка задняя правая	1 шт.
Прогон нижний правый передний	1 шт.
Стенка задняя выдвижного ящика	1 шт.
Стенка левая выдвижного ящика	1 шт.
Стенка правая выдвижного ящика	1 шт.
Фасад выдвижного ящика	1 шт.
Прогон перегородки	1 шт.
Перегородка нижняя	1 шт.
Уголок мебельный	4 шт.
Евровинт 6,3×13	4 шт.
Конфирмат	18 шт.
Опора стола	6 шт.
Полкодержатель	4 шт.
Саморез 3×20	8 шт.
Панелька под направляющие	6 шт.
Саморез 3×12	34 шт.
Направляющие	3 комплекта
Шкант мебельный	18 шт.
Ручка мебельная	4 комплекта
Заглушка декоративная	1 шт.
Шток эксцентрика	6 шт.
Эксцентрик	6 шт.
Заглушка эксцентрика	6 шт.
Защелка магнитная	1 шт.
Панелька магнита	1 шт.
Петля для дверей из ЛДСП	1 комплект
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкции по сборке	1 шт.
Примечание - Фасады ящиков и двери могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнений в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении основных частей стола обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- выдвижение ящиков обеспечивается без дополнительных усилий;
- отсутствие перекосов ящиков как относительно друг друга, так и относительно стенок стола;
- устройства, предотвращающие выпадение ящиков из корпуса при их выдвижении, выполняют свое функциональное назначение;


- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

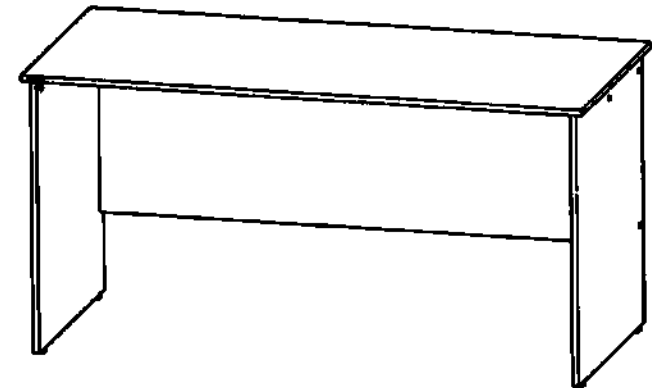

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

**СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. I)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942810.233 РЗ**

ОМ 29.1232.01 от 19.04.2024 г.

Стол для размещения медицинских изданий (мод. 1) (в дальнейшем – стол), предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораторных) для размещения и хранения медицинских изданий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Назначение и применение: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораторных) для размещения медицинских изданий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораторных лечебно-профилактических учреждениях.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потребительские требования – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении или профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

1. Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор!

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы выше установленных норм!

3. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 23,8 ± 2,3 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: (1500 × 701 × 756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью выкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг.

2.3 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.4 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.5 Стол изготовлен из ЛДСП. Стол устанавливается на мебельные ножки с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения медицинских изданий (мод. 1)	
1 Стол для размещения медицинских изданий (мод. 1) - 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Упор столешницы	1 шт.
Конфирмат	8 шт.
Заглушка конфирмата	8 шт.
Шкант мебельный	8 шт.
Опора стола	4 шт.
Эксцентрик	8 шт.
Шток эксцентрика	8 шт.
Заглушка эксцентрика	8 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Логотип компании	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратиться к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский р-н.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОМ 29.1232.01 от 19.04.2024 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- подвешивать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих повреждение шарнира на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) проверки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Свидетельство в приложении

Стол для размещения медицинских изданий (мод.1) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатмский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25


ЕЛАМЕД

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpr@elamed.com

Сайт компании: lpr.elamed.com

Регистрационное удостоверение

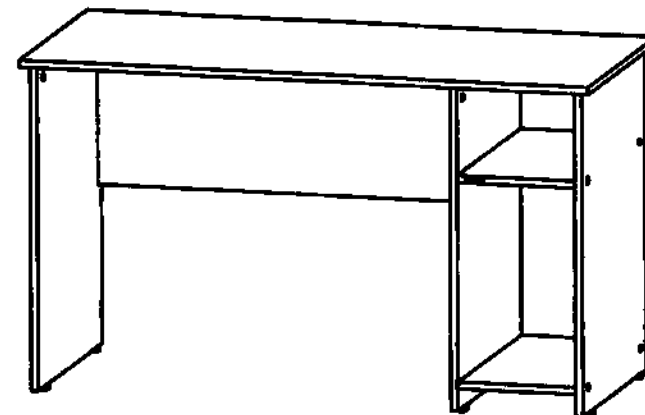

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942818.114ТУ

**СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 2)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.210 РЭ**

Стол для размещения медицинских изделий (мод. 2) (в дальнейшем – стол), предназначен для применения в специализированных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Пенализация и применение: применяется в специализированных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потребительские требования – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинской и научной персонал при осуществлении или профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

1. Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости регулируйте высоту опор.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы и полок выше установленных норм!

3. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 32,0 ± 3,2 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: (1300 × 600 × 756) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью выкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг;

2.3 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.4 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.5 Стол изготовлен из ЛДСП. Справа в стол встроена тумба в виде ниши с несъемной полкой, делающей тумбу на две секции. Стол устанавливается на шесть мебельных ножек с возможностью регулировки по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения медицинских изделий (мод. 2)	
1 Стол для размещения медицинских изделий (мод. 2) – 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Стенка задняя	1 шт.
Стенка средняя	1 шт.
Основание тумбы	1 шт.
Полка тумбы	1 шт.
Конфирмат	12 шт.
Заглушка конфирмата	12 шт.
Шкафт мебельный	14 шт.
Эксцентрик	6 шт.
Шток эксцентрика	6 шт.
Заглушка эксцентрика	6 шт.
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Опора стола	6 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в соответствии с ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатямский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- подержать поверхности стола воздействием предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) протирки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей стола путем протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путем протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, прибавленных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Сертификат о приемке

Стол для размещения изделий (мод. 2) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатямский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25



Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: ipm@elamed.com

Сайт компании: ipm.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ОМ 29.1235.01 от 19.04.2024 г.

 **ЕЛАМЕД**

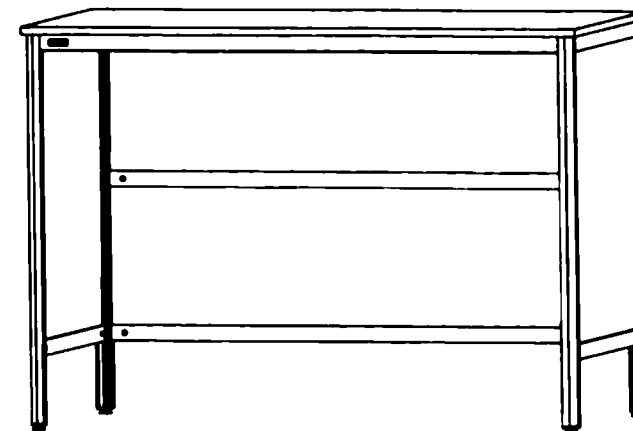

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.114ТУ

**СТОЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
(мод. 3)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.216 РЭ**

ОМ 29.1235.01 от 19.04.2024 г.

Стол для размещения медицинских изделий (мод. 3) (в дальнейшем – стол), предназначен для применения в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения и хранения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Назначение и применение: применяется в специальных медицинских помещениях (процедурных, смотровых кабинетах, лабораториях) для размещения медицинских изделий с возможностью обработки рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами при проведении медицинских исследований, направленных на профилактику, диагностику, лечение заболеваний и мониторинг состояния организма человека.

Область применения: стол используется в процедурном, смотровом кабинетах, в лабораториях лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители – работники медицинских и исследовательских учреждений и организаций (медицинский и научный персонал при осуществлении своей профессиональной деятельности). Специального технического образования не требуется.

Меры предосторожности:

! Перед использованием стола проверьте его устойчивость, при необходимости отрегулируйте высоту опор!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагружать рабочие поверхности столешницы выше установленных норм!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса стола 15,3 ± 1,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм: (1200 × 601 × 848) ± 10.

Габаритный размер стола по высоте указан при полностью вкрученных опорах.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы стола – пять лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления стола.

2.2 Номинальная нагрузка стола при равномерном распределении:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг.

2.3 Стол имеет регулируемые по высоте опоры в виде мебельных ножек, максимальный диапазон регулировки 21 мм.

2.4 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от + 10 °С до + 35 °С; номинальное значение относительной влажности 80 % при + 25 °С.

2.5 Стол изготовлен из алюминиевого профиля с полимерно-порошковыми покрытиями, стенки заполнены сэндвич-панелью. Стол комплектуется столешницей из влагостойкой ЛДСП. Стол устанавливается на четыре мебельные ножки, регулируемые по высоте. Стол поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке.

3. Комплект поставки:

Сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Стол для размещения медицинских изделий (мод. 3)	
1 Стол для размещения медицинских изделий (мод. 3) – 1 шт., в составе:	
Столешница	1 шт.
Стенка левая	1 шт.
Стенка правая	1 шт.
Прогон нижний задний	2 шт.
Прогон верхний задний	1 шт.
Прогон верхний передний	1 шт.
Стенка задняя	2 шт.
Уголок мебельный	4 шт.
Евроант 6,3×13	4 шт.
Заглушка декоративная	1 шт.
Опора стола	4 шт.
Логотип компании	1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
3 Инструкция по сборке	1 шт.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 50 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 25 °С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от – 50 °С до + 40 °С и относительная влажность не более 98 % при + 25 °С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 или 1 % раствором хлоринакса по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильном функционировании стола, при повреждении составных частей стола обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, д.п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1404 линии 8 800 350-06-13.

ОМ 29.1235.01 от 19.04.2024 г.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже + 10 °С стол необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- крепежные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Отрывания в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- поддевать поверхности стола воздействием предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем вышеуказанных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки стола.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуальной осмотры всей конструкции стола не реже одного раза в месяц;

б) протирки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в шесть месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СП 2.1.3678-2020 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещен стол

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют свои функции и не обеспечивают полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде жизнедеятельно безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Сертификат о приеме

Стол для размещения медицинских изделий (мод. 3) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.114ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код

№ партии

Штамп ОТК

Дата упаковки

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, д.п. Елатьма, ул. Янина, 25

ЕЛАМЕД

Тел./факс: (49131) 2-04-57

Телефон бесплатной горячей линии: 8 800 350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 15 листа(ов).

Директор проектного офиса АО «ЕПЗ»

Крошкин М.В.

20 22

