

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НИТА»



Н.Ю.Горшененко

**КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТУ 32.50.50-005-10713095-2021**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Редакция от «12» декабря 2022 г.

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование – Комплект изделий медицинский одноразовый нестерильный из нетканых материалов по ТУ 32.50.50-005-10713095-2021 (в дальнейшем – комплект)

Варианты исполнений медицинского изделия:

1 Комплект инфекциониста в составе:

- 1.1 Комбинезон (артикулы 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 – с окантовкой по швам или с герметичной лентой на швах; размеры М, L, XL, XXL, XXXL) – 1 шт.
- 1.2 Халат (артикулы 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05-рукава на манжете или на резинке, 1.06 - рукава на манжете или на резинке; размеры: 50-52, 52-54, 54-56, 58-60, длина 120 или 140) – 1 шт.
- 1.3 Нарукавники (артикулы 10.1, 10.2) (при необходимости) – 1 пара.
- 1.4 Бахилы (артикулы 4.01, 4.02, 4.03, 4.04) (при необходимости) – 1 пара.
- 1.5 Фартук (артикулы 9.00, удлиненный или укороченный) (при необходимости) – 1 шт.
- 1.6 Шапочка (артикулы 6.01, 6.02, 6.03; размеры S, M, L) (при необходимости) – 1 шт.
- 1.7 Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 производства ООО "МАСКА", РУ № ФСР 2010/08512 (при необходимости) – 1 шт.
- 1.8 Простыня (артикулы Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06) (при необходимости) – не более 3 шт.
- 1.9 Инструкция по применению – 1 шт.

2 Комплект хирурга, в составе:

- 2.1 Халат (артикулы 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05-рукава на манжете или на резинке, 1.06 - рукава на манжете или на резинке; размеры: 50-52, 52-54, 54-56, 58-60, длина 120 или 140) – 1 шт.
- 2.2 Рубашка (артикул 2.01/1; размеры: 48-52, 52-56, 56-60, 62-66) (при необходимости) – 1 шт.
- 2.3 Брюки (артикул 2.02/2; размеры: 48-52, 52-56, 56-60, 62-66) (при необходимости) – 1 шт.
- 2.4 Шапочка (артикулы 6.01, 6.02, 6.03; размеры S, M, L) (при необходимости) – 1 шт.
- 2.5 Бахилы (артикулы 4.01, 4.02, 4.03, 4.04) – 1 пара.
- 2.6 Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 производства ООО "МАСКА", РУ № ФСР 2010/08512 (при необходимости) – 1 шт.
- 2.7 Перчатки латексные неопудренные нестерильные текстурированные, размеры XS, S, M, L, XL, производства «Топ Глав Сдн. Бхд.» (Малайзия), РУ № РЗН 2018/7425 или Перчатки латексные опудренные нестерильные, опудренные гладкие, размеры XS, S, M, L, XL, производства «Топ Глав Сдн. Бхд.» (Малайзия), РУ № РЗН 2018/7426 (при необходимости) – 1 пара.
- 2.8 Простыня (артикулы Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06) (при необходимости) – не более 3 шт.
- 2.9 Инструкция по применению – 1 шт.

3 Комплект для персонала, в составе:

- 3.1 Комбинезон (артикулы 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - с окантовкой по или с герметичной лентой на швах; размеры М, L, XL, XXL, XXXL) – 1 шт.
- 3.2 Бахилы (артикулы 4.01, 4.02, 4.03, 4.04) – 1 пара.
- 3.3 Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 производства ООО "МАСКА", РУ № ФСР 2010/08512 – 1шт.
- 3.4 Простыня (артикулы Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06) (при необходимости) – не более 3 шт.
- 3.5 Инструкция по применению – 1 шт.

4 Комплект универсальный, в составе:

- 4.1 Халат (артикулы 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05-рукава на манжете или на резинке, 1.06-рукава на манжете или на резинке; размеры: 50-52, 52-54, 54-56, 58-60, длина 120 или 140) или Накидка (артикулы 13.00; размеры: М, L) – 1 шт.
- 4.2 Шапочка (артикулы 6.01, 6.03; размеры S, M, L) – 1 шт.
- 4.3 Бахилы (артикулы 4.01, 4.02, 4.03, 4.04) – 1 пара.
- 4.4 Простыня (артикулы Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06) (при необходимости) – не более 3 шт.

4.5 Салфетка (артикулы Б15.01; Б15.02; Б15.03; Б15.04; Б15.05) (при необходимости) – не более 3 шт.

4.6 Тапки (артикул 7.02; размеры 36-38, 39-41, 42-44) (при необходимости) – 1 пара.

4.7 Инструкция по применению – 1 шт.

5 Комплект гинекологический, в составе:

5.1 Рубашка для рожениц (артикул 8.00; размеры: 46-50, 50-54, 54-60) – 1 шт.

5.2 Бахилы (артикулы 4.01, 4.02, 4.03, 4.04) – 1 пара.

5.3 Шапочка (артикулы 6.01, размеры S, M, L) – 1 шт.

5.4 Салфетка (артикул Б 15.03, Б 15.04, Б 15.05) – 2 шт.

5.5 Простыня (артикулы Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06) (при необходимости) – не более 3 шт.

5.6 Инструкция по применению – 1 шт.

6 Комплект урологический, в составе:

6.1 Трусы (артикулы 5.01- с разрезом и без; 5.02) – 1 шт.

6.2 Простыня (артикул Б13.01, Б13.02) – 1 шт.

6.3 Салфетка (артикул Б15.01, Б15.02) – 2 шт.

6.4 Носки (артикул 7.01; размеры 36-38, 39-41, 42-44) – 1 пара.

6.5 Инструкция по применению – 1 шт.

7 Комплект патологоанатомический, в составе:

7.1 Халат (артикулы 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05-рукава на манжете или на резинке, 1.06 - рукава на манжете или на резинке; размеры: 50-52, 52-54, 52-54, 54-56, 58-60, длина 120 или 140) (при необходимости) – 1 шт.

7.2 Фартук (артикулы 9.00, удлиненный или укороченный) – 1 шт.

7.3 Наручники (артикул 10.1, 10.2) – 2 шт.

7.4 Шапочка (артикул 6.03, размеры S, M, L) – 1 шт.

7.5 Чехол (мешок) патологоанатомический (артикул 12.00) – 1 шт.

7.6 Простыня (артикул Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06) – 1 шт.

7.7 Инструкция по применению – 1 шт.

2 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «НИТА» (ООО «НИТА»)

Адрес: Россия, 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, оф.16

Телефон: +7(4932) 34-62-12

E-mail: nita-mo@yandex.ru

3 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «НИТА» (ООО «НИТА»)

Адрес: Россия, 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, оф.16

Телефон: +7(4932) 34-62-12

E-mail: nita-mo@yandex.ru

4 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Для защиты медицинских работников и пациента от перекрестной инфекции (взаимного заражения) при осмотре пациента или проведении медицинских процедур.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Технические характеристики

5.1.1 Комплект соответствует требованиям ТУ 32.50.50-005-10713095-2021 и комплекта конструкторской документации КД.Н.32.50.50-005

5.1.2 Варианты исполнений комплекта и изделия, входящие в состав представлены в п. 1.

5.1.3 Класс в зависимости от потенциального риска применения в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508-2012 и Приказа Минздрава России от 06.06.2012г. № 4н.


5.1.4 Изделия комплекта изготавливаются из материалов, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Материалы изделий комплекта


№	Материал	Изготавливаемые детали изделий
1	Нетканое полипропиленовое полотно	Полочка, капюшон, спинка, рукава, ветрозащитный клапан, верхняя часть, нижняя часть, окантовка по швам комбинезона. Полочка, завязки, рукава, горловина, спинка халата. Полотно, завязки накидки. Полотно, двойная подошва, завязки бахил. Полочка, рукава рубашки. Полотно брюк. Полотно шапочки-берета. Перед, задник, завязки шапочки-шлема. Полотно, дно, завязки шапочки-колпака. Верхняя часть, окантовка, верхний слой подошвы тапок. Полочка, спинка рубашки для рожениц. Полотно носков. Полотно трусов. Простыня.
2	Нетканое полипропиленовое полотно СС ламинированное полиэтиленом	Полочка, капюшон, спинка, рукава, ветрозащитный клапан, верхняя часть, нижняя часть, окантовка по швам комбинезона. Двойная подошва бахил. Полотно нарукавников. Фартук. Простыня. Полотно чехла (мешка) патологоанатомического.
3	Застежка-молния пластмассовая спиральная на полиэфирной ткани	Застежка-молния комбинезона. Застежка-молния чехла (мешка) патологоанатомического.
4	Резинка вязанная (полиэфир, латекс)	Резинка комбинезона. Резинка на рукавах халата. Резинка бахил. Низ нарукавников. Резинка нарукавников. Резинка брюк. Резинка шапочки-берета. Резинка шапочки-шлема. Резинка носков. Резинка трусов.
5	Манжетная белая трубка	Манжеты на рукавах комбинезона. Манжеты на рукавах халата. Низ нарукавников.
6	Ткань для пошива одежды марки Коиси	Герметичные швы комбинезона.
7	Полиамид	Застежка (кнопка) халата.
8	Лента петельная (липучка)	Застежка (липучка) халата, комбинезона
9	Вспененный полиэтилен	Подошва тапок.
10	Материал нетканый «Спанлейс»	Салфетка.

5.1.5 Основные размеры комбинезона должны соответствовать рисунку 1 и таблице 2.


Артикул 3.01, 3.02

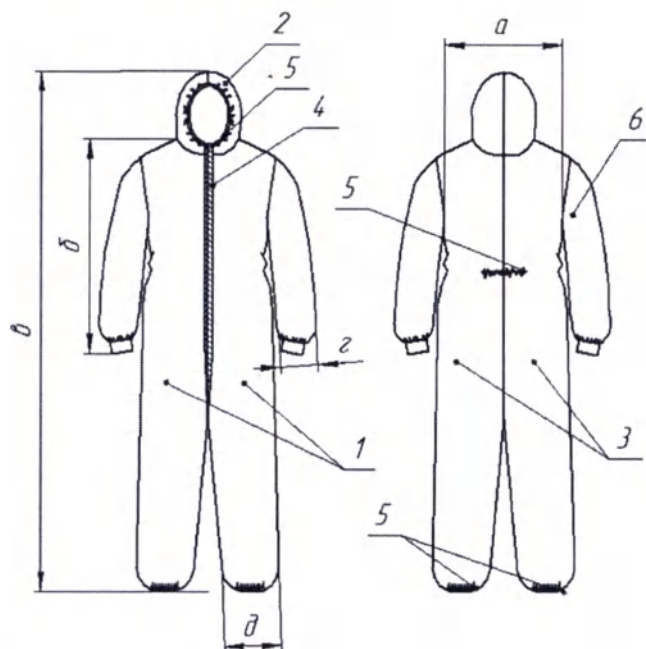

Артикул 3.03

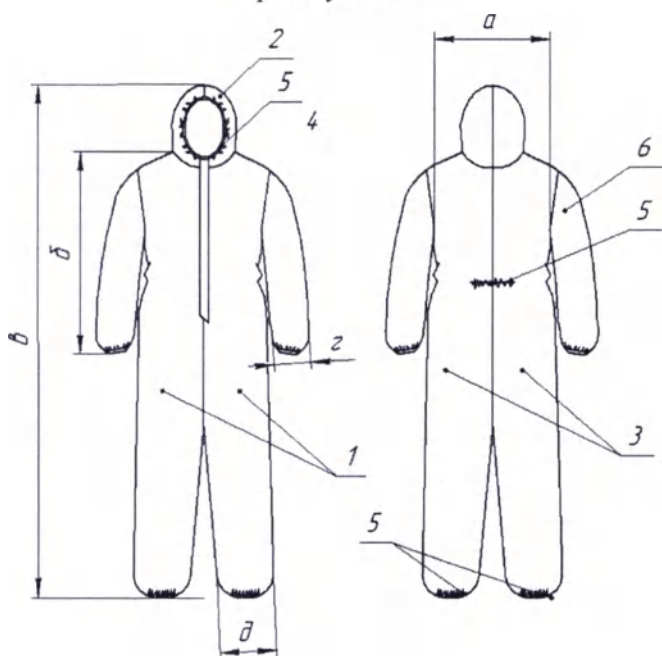

Артикул 3.04

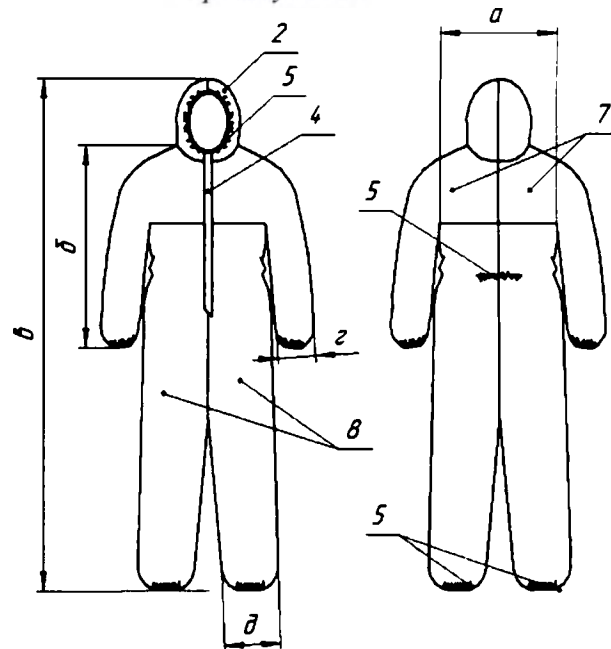

1- Пюльчка, 2- Капюшон, 3 –спинка, 4- застёжка на молнии, 5-резинка, 6 – рукава, 7 – верхняя часть
8 – нижняя часть

Рисунок 1 – Комбинезон

Варианты исполнения комбинезона:

Артикул 3.01 – застёжка без ветрозащитного клапана; рукава на резинке.

Артикул 3.02 – застёжка без ветрозащитного клапана; рукава на манжете.

Артикул 3.03 – застёжка с ветрозащитным клапаном; рукава на резинке.

Артикул 3.04 – тайвек, с окантовкой по швам или проклеенными швами; рукава на резинке.


Таблица 2 – Основные размеры комбинезона

Размер	М	Л	XL	XXL	XXXL
а	78,0±2,0 см	81,0±2,0 см	84,0±1,5см	86,0±1,5см	88,0±1,5см
б	83,0±2,0см	84,0±2,0см	85,0±2,0см	85,5 ±2,0см	86,0 ±2,0см
в	199,0±3,5см	201,5±3,5см	204,0±3,5см	205,5±3,5см	207,0±3,5см
г	21,0±1,5см	21,5±1,5см	22,0±1,5см	22,5±1,5см	23,0±1,5см
д	29,0±1,5см	30,0±1,5см	31,0±1,5см	32,0±1,5см	33,0±1,5см

5.1.6 Основные размеры халата должны соответствовать рисунку 2 и таблице 3.

Артикул 1.01, 1.02


Артикул 1.03, 1.04

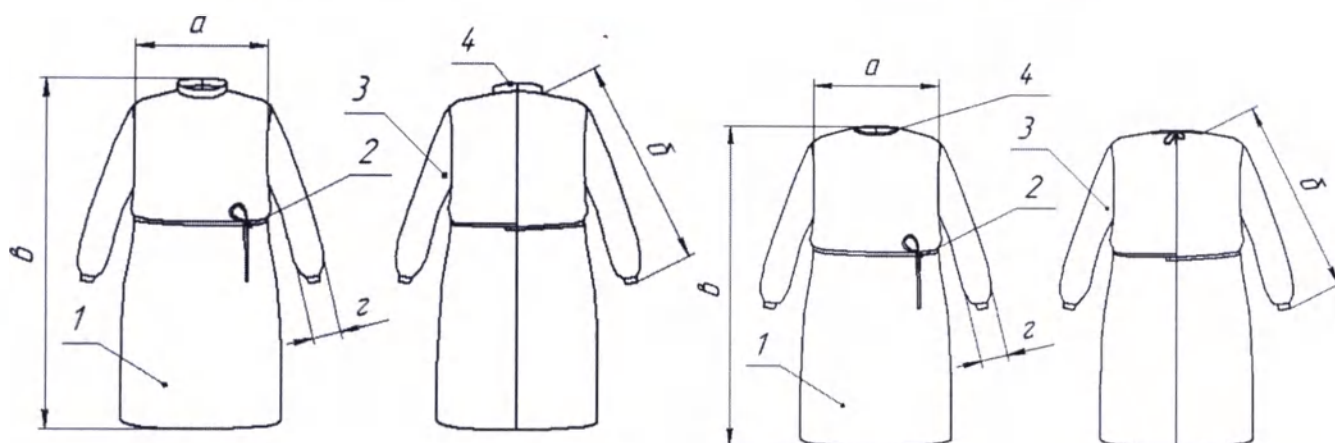

1-Полочка, 2- Завязки, 3-Рукава, 4-Горловина

Артикул 1.05

Артикул 1.06

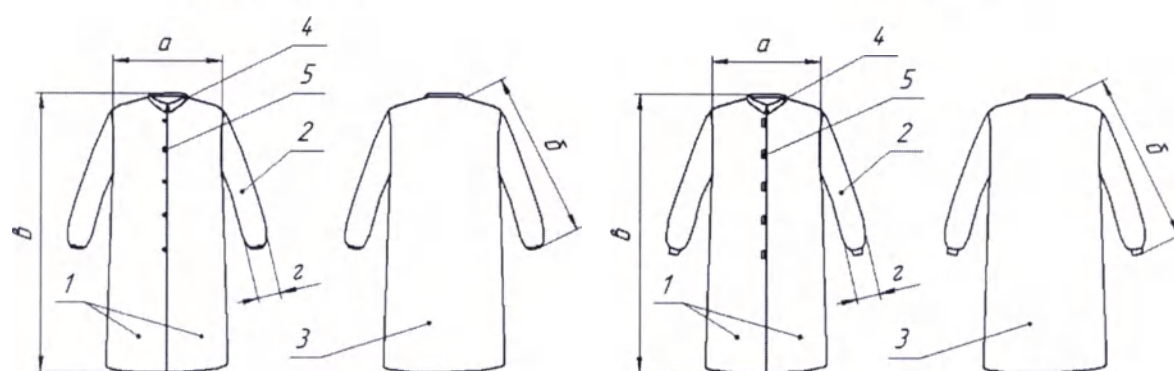

1-Полочка, 2-Рукава, 3-Спинка, 4-Горловина, 5-Застежка

Рисунок 2 – Халат

Варианты исполнения халата:

Артикул 1.01 – рукава на резинке, горловина со стойкой

Артикул 1.02 – рукава на манжете, горловина со стойкой

Артикул 1.03 – рукава на резинке, горловина на завязках

Артикул 1.04 – рукава на манжете, горловина на завязках

Артикул 1.05 – рукава на манжете или на резинке, застежка на кнопках, горловина с воротником


Артикул 1.06 – рукава на манжете или на резинке, застежка на липучках, горловина с воротником

Таблица 3 – Основные размеры халата

Размер	50-52	52-54	54-56	58-60
Длина 120 см				
а	62,0±2,0 см	68,0±2,0 см	74,0±2,0 см	80,0±2,0 см
б	80,5±2,0 см	84,5±2,0 см	89,5±2,0 см	94,5±2,0 см
в	120,0±5,0см	120,0±5,0см	120,0±5,0см	120,0±5,0см
г	20,0±1,5 см	20,5±1,5 см	21,0±1,5 см	22,0±1,5 см
Длина 140 см				
а	62,0±2,0 см	68,0±2,0 см	74,0±2,0 см	80,0±2,0 см
б	80,5±2,0 см	84,5±2,0 см	89,5±2,0 см	94,5±2,0 см

в	140,0±5,0см	140,0±5,0см	140,0±5,0см	140,0±5,0см
г	20,0±1,5 см	20,5±1,5 см	21,0±1,5 см	22,0±1,5 см

5.1.7 Основные размеры накидки должны соответствовать рисунку 3 и таблице 4

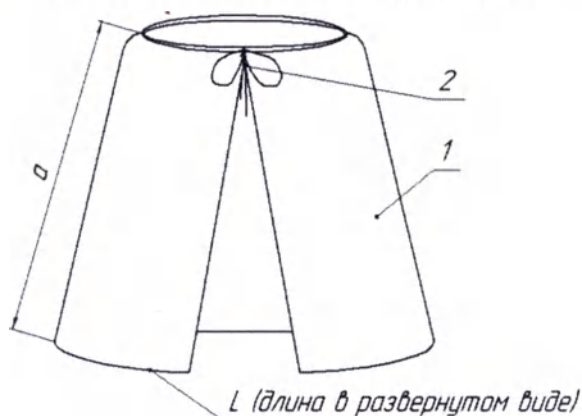

1-Полотно, 2-Завязки

Рисунок 3 – Накидка

Варианты исполнения накидки:


Артикул 13.00

Таблица 4 – Основные размеры накидки


Размер	М	Л
а	110,0±8,0см	130,0±8,0см
L	140,0±8,0см	140,0±8,0см

5.1.8 Основные размеры бахил должны соответствовать рисунку 4 и таблице 5.

Исполнение-на завязках

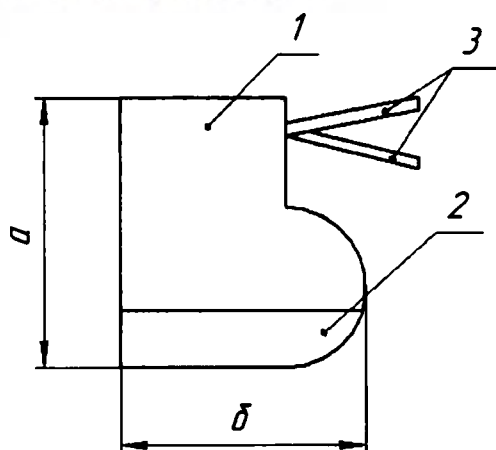

Исполнение-на резинке

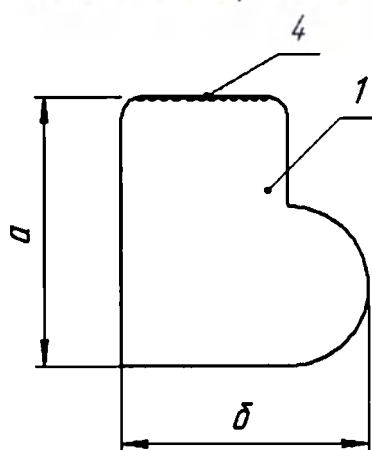

1-Полотно, 2-Двойная подошва, 3-Завязки, 4-Резинка

Рисунок 4 – Бахилы

Варианты исполнения бахил:

Артикул 4.01 – низкие, на резинке

Артикул 4.02 – низкие, на завязках, с двойной подошвой


Артикул 4.03 – высокие на резинке

Артикул 4.04 – высокие на завязках, с двойной подошвой

Таблица 5 – Основные размеры бахил

Размеры	Высокие	Низкие
а	60,0±1,5см	40,0±1,5см
б	40,0±1,5см	40,0±1,5см

5.1.9 Основные размеры нарукавников должны соответствовать рисунку 5 и таблице 5.

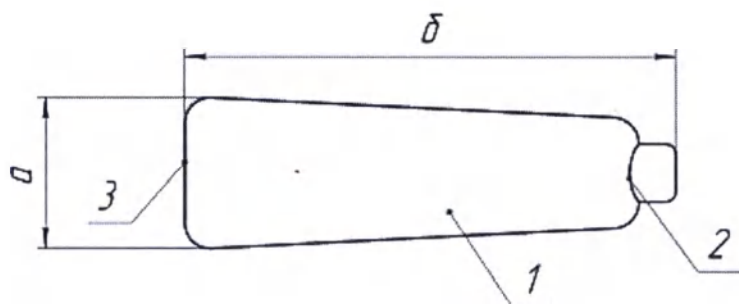

1-Полотно, 2-Низ, 3-Резинка

Рисунок 5 – Нарукавники

Варианты исполнения нарукавников:

Артикул 10.1 – низ на манжете

Артикул 10.2 – низ на резинке

Таблица 5 – Основные размеры нарукавников

Размер	Значение
а	22,0±2,0см
б	45,0±2,0см

5.1.10 Основные размеры фартука должны соответствовать рисунку 6 и таблице 6.

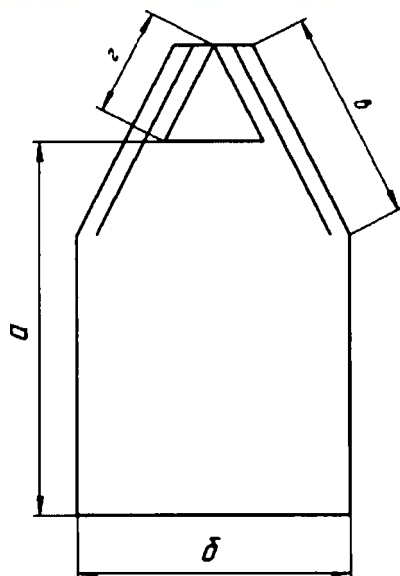


Рисунок 6 – Фартук


Варианты исполнения фартука:

Артикул 9.00 – удлиненный или укороченный

Таблица 6 – Основные размеры фартука

Размер	Артикул 9.00 удлиненный	Артикул 9.00 укороченный
а	140,0±8,0см	120,0±8,0см
б	80,0±2,0см	80,0±2,0см
в	80,0±2,0см	80,0±2,0см
г	40,0±2,0см	40,0±2,0см

5.1.11 Основные размеры рубашки должны соответствовать рисунку 7 и таблице 7.

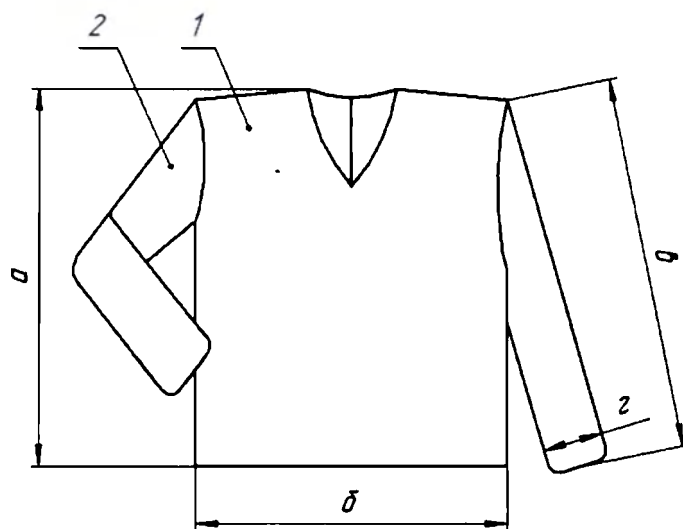

1-Полочка, 2-Рукава

Рисунок 7 – Рубашка


Варианты исполнения:

Артикул 2.01/1

Таблица 7 – Основные размеры рубашки

Размер	48-52	52-56	56-60	62-66
а	80,0±2,5см	83,0±2,5см	84,0±2,5см	86,0±2,5см
б	64,0±2,5см	68,0±2,5см	72,0±2,5см	74,0±2,5см
в	60,0±2,0см	63,0±2,0см	65,5±2,0см	67,0±2,0см
г	18,0±1,5см	19,0±1,5см	20,0±1,5см	21,0±1,5см

5.1.12 Основные размеры брюк должны соответствовать рисунку 8 и таблице 8.

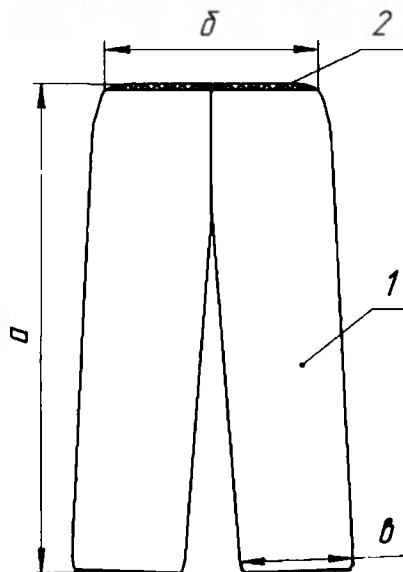

1-Полотно, 2-Пояс на резинке

Рисунок 8 – Брюки

Варианты исполнения:

Артикул 2.02/2

Таблица 8 – Основные размеры брюк

Размер	48-52	52-56	56-60	62-66
а	120,0±4,0см	124,0±4,0см	127,0±4,0см	132,0±4,0см
б	62,0±2,5см	65,5±2,5см	67,0±2,5см	73,0±2,5см
в	22,0±0,5см	24,0±1,5см	25,5±1,5см	27,0±1,5см


5.1.13 Основные размеры шапочки должны соответствовать рисунку 9-11 и таблице 9-11

Варианты исполнения шапочки:

Артикул 6.01 – Шапочка берет

Артикул 6.02 – Шапочка-шлем

Артикул 6.03 – Шапочка-колпак

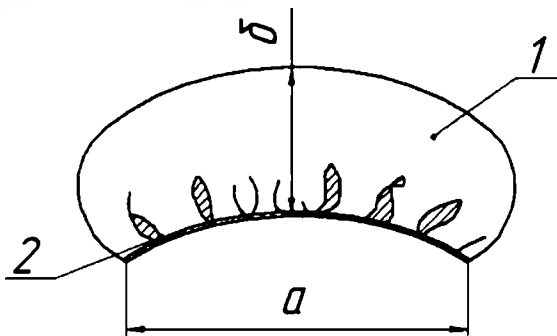


1-Полотно, 2-Резинка

Рисунок 9 – Артикул 6.01-Шапочка берет

Таблица 9 – Основные размеры шапочки –берет

Размер	S	M	L
a	48,0±2,0см	50,0±2,0см	52,0±2,0см
б	23,0±2,0см	25,0±2,0см	27,0±2,0см

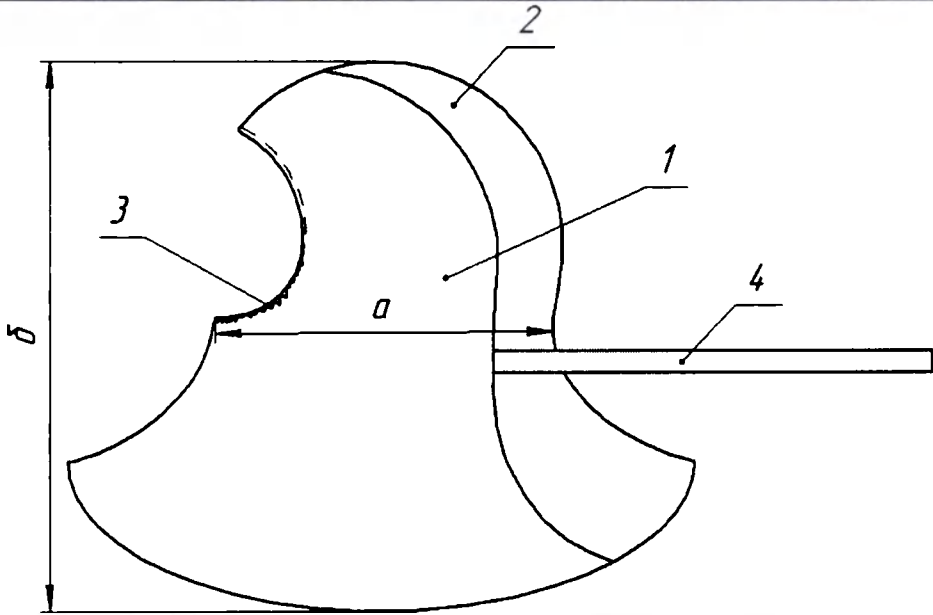


1-Перед, 2-Задник, 3-Резинка, 4-Завязки

Рисунок 10 – Артикул 6.02-Шапочка-шлем

Таблица 10 – Основные размеры шапочки – шлем

Размер	S	M	L
a	31,0±2,0см	33,0±2,0см	34,0±2,0см
б	52,0±2,0см	53,0±2,0см	54,0±2,0см

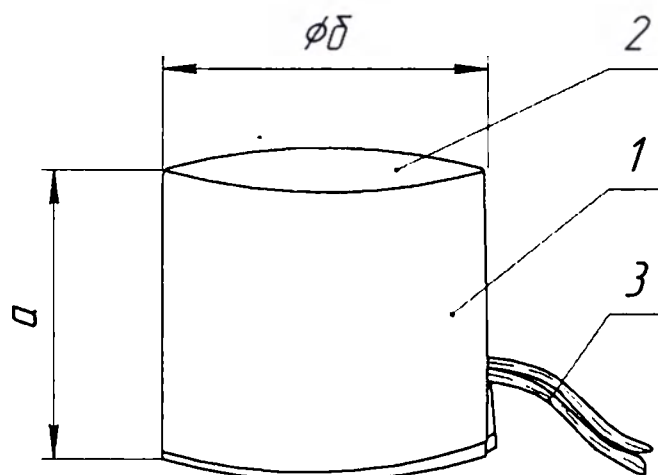


1-Полотно, 2-Дно, 3-Завязки

Рисунок 11 – Артикул 6.03- Шапочка-колпак

Таблица 11 — Основные размеры шапочки – колпак

Размер	S	M	L
a	18,0±2,0см	20,0±2,0см	22,0±2,0см
б	28,0±2,0см	30,0±2,0см	32,0±2,0см

5.1.14 Основные размеры тапок должны соответствовать рисунку 12 и таблице 12

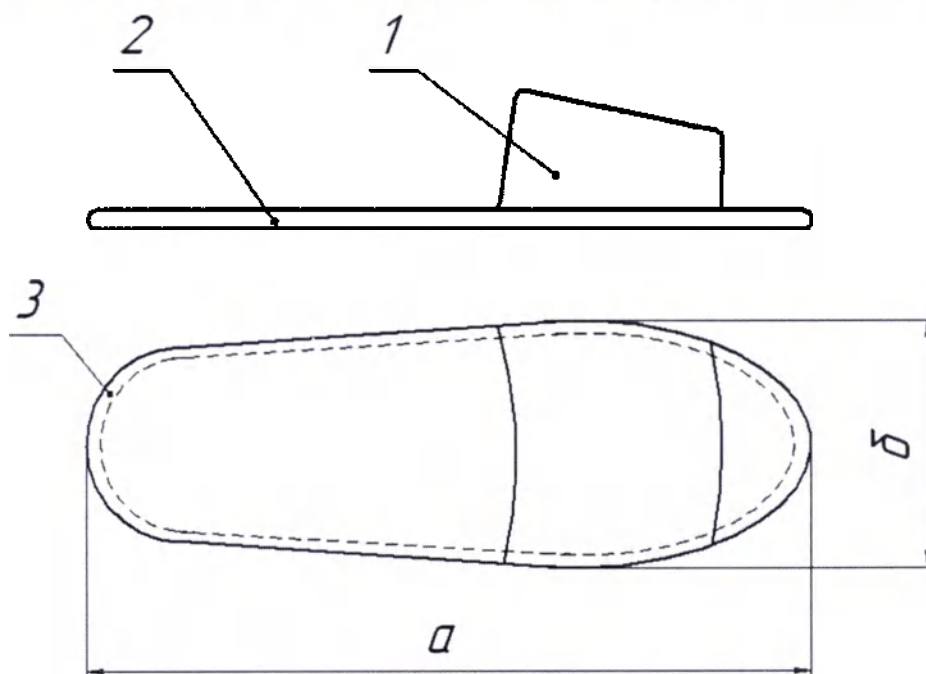

1-Верхняя часть, 2-Подошва, 3-Окантовка

Рисунок 12 – Тапки


Варианты исполнения тапок:

Артикул 7.02

Таблица 12 – Основные размеры тапок

Размер	36-38	39-41	42-44
б	9,0±1,0см	10,5±1,0см	12,0±1,0см
a	25,0±1,5см	28,0±1,5см	31,0±1,5см

5.1.15 Основные размеры рубашки для рожениц должны соответствовать рисунку 13 и таблице 13

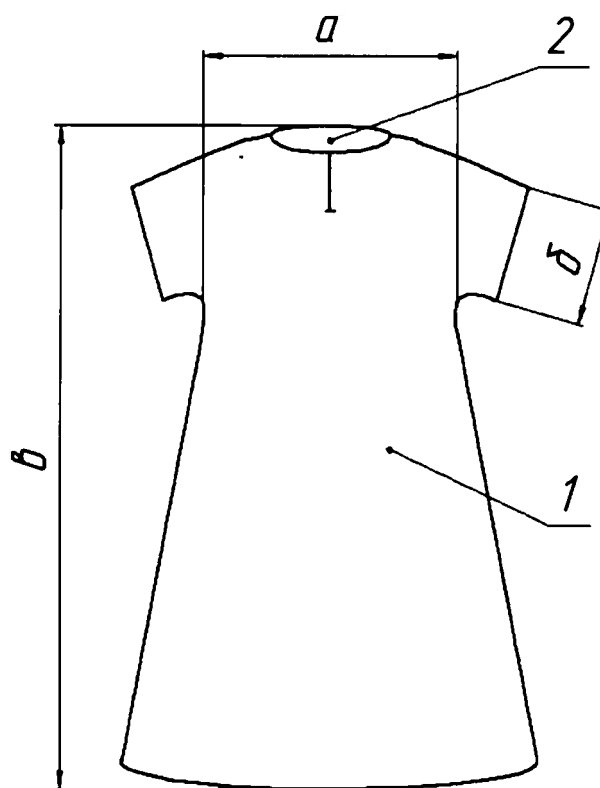

1-Полочка, 2-Спинка

Рисунок 13 – Рубашка для рожиц


Варианты исполнения рубашки для рожиц:

Артикул 8.00

Таблица 13 – Основные размеры рубашки для рожиц

Размер	46-50	50-54	54-60
а	72,0±2,0см	76,0±2,0см	82,0±2,0см
б	24,0±1,5см	25,0±1,5см	26,0±1,5см
в	110,0±8,0см	120,0±8,0см	130,0±8,0см

5.1.16 Основные размеры носков должны соответствовать рисунку 14 и таблице 14

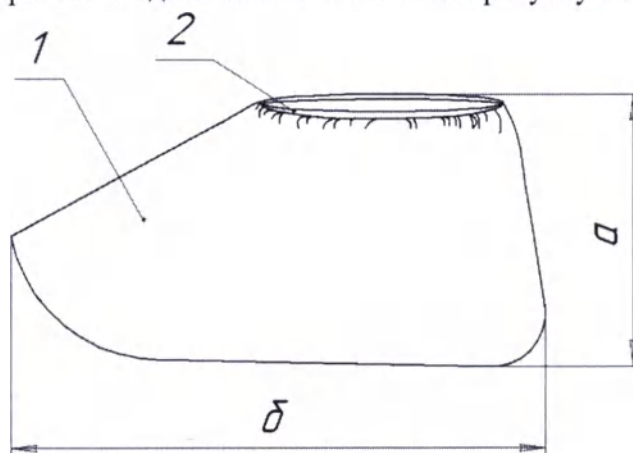

1-Полотно, 2-Резинка

Рисунок 14 – Носки


Варианты исполнения носков:

Артикул 7.01


Таблица 14 – Основные размеры носков.

Размер	36-38	39-41	42-44
а	13,0±1,0см	15,0±1,0см	17,0±1,0см
б	35,0±1,5см	38,0±1,5см	41,0±1,5см

5.1.17 Основные размеры трусов должны соответствовать рисункам 15-16 и таблице 15

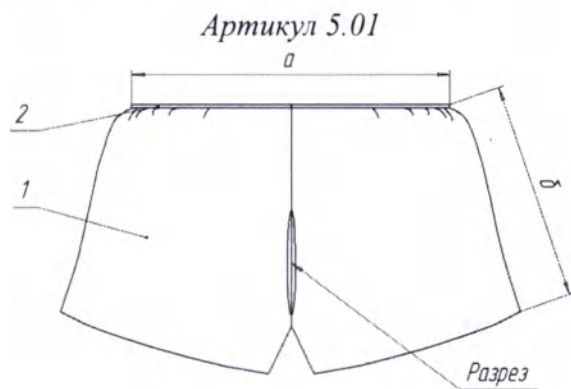

1-Полотно, 2-Резинка
Рисунок 15 – Трусы

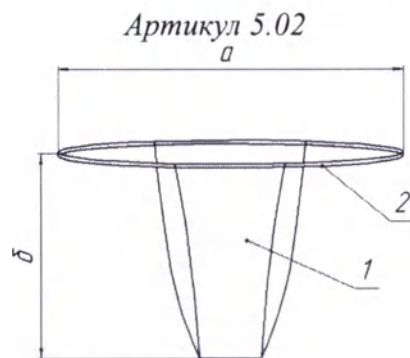

1-Полотно, 2-Резинка
Рисунок 16 – Трусы бикини

Варианты исполнения трусов:

Артикул 5.01 – трусы с разрезом или без

Артикул 5.02 – трусы бикини

Таблица 15 – Основные размеры трусов

Размер	5.01 (универсальные)	5.02 (универсальные)
а	30,0±1,5см	30,0±1,5см
б	46,0±1,5см	26,5±1,5см

5.1.18 Основные размеры салфетки должны соответствовать рисунку 17 и таблице 16

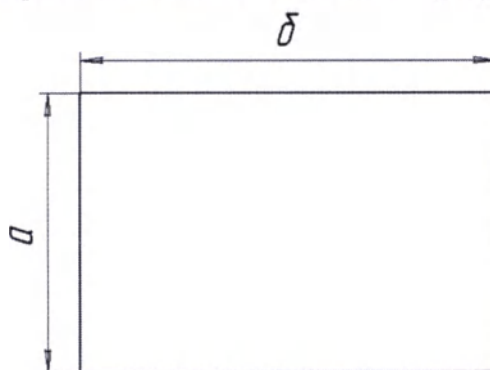


Рисунок 17 – Салфетка

Варианты исполнения салфетки:

Артикулы Б15.01; Б15.02; Б15.03; Б15.04; Б15.05 – листом

Таблица 16 – Основные размеры салфетки

Артикул	а, см	б, см
Б15.01	20,0±2,5	20,0±2,5
Б15.02	40,0±2,5	20,0±2,5
Б15.03	40,0±2,5	40,0±2,5
Б15.04	50,0±2,5	60,0±2,5
Б15.05	50,0±2,5	50,0±2,5

5.1.19 Основные размеры простыни должны соответствовать рисунку 18 и таблице 17

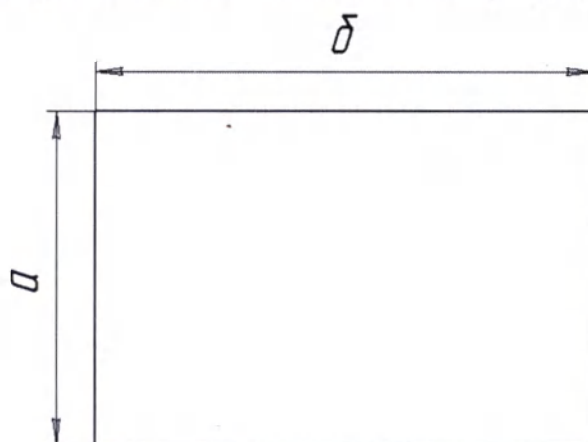


Рисунок 18 –Простыня


Варианты исполнения простыни:

Артикулы Б13.01; Б13.02; Б13.03; Б13.04; Б13.05; Б13.06 – листом

Таблица 17– Основные размеры простыни

Артикул	а, см	б, см
Б13.01	80,0±3,5	70,0±3,5
Б13.02	200,0±3,5	70,0±3,5
Б13.03	200,0±3,5	140,0±3,5
Б13.04	200,0±3,5	80,0±3,5
Б13.05	180,0±3,5	160,0±3,5
Б13.06	140,0±3,5	70,0±3,5

5.1.20 Основные размеры чехла(мешка) патологоанатомического должны соответствовать рисунку 19 и таблице 18

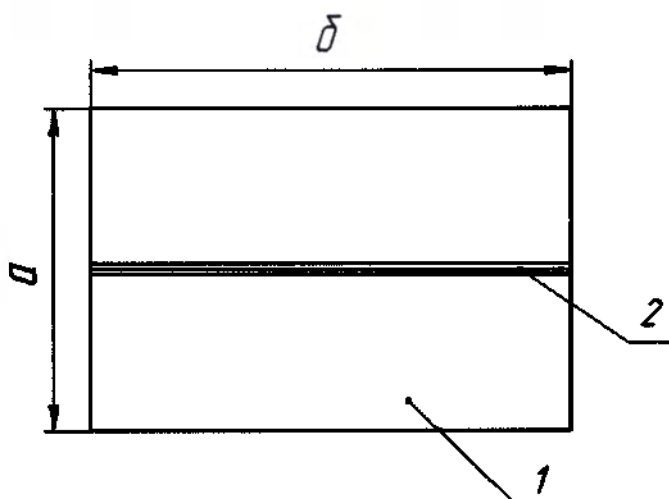

1-Полотно, 2-застежка

Рисунок 19 – Чехол (мешок) патологоанатомический

Варианты исполнения чехла(мешка) патологоанатомического:

Артикул 12.00

Таблица 18 – Основные размеры чехла(мешка) патологоанатомического

Артикул	а, см	б, см
12.00	90,0±10,0	210,0±10,0

5.1.21 Прочность при растяжении простыни, комбинезона, халата, рубашки и брюк не менее 20 Н.

5.1.22 Прочность при растяжении рубашки для рожениц, бахил, нарукавников, фартука не менее 10 Н.

5.1.23 Прочность при растяжении чехла (мешка) патологоанатомического не менее 30 Н.

5.1.24 Прочность при растяжении шва соединения завязок изделий комплекта не менее 10 Н

5.1.25 Абсорбционная ёмкость салфетки не менее 100 %.

5.1.26 Детали изделий скрепляются пошивом нитками 40/2 из полиэфира по ТУ 8147-045-00319629-2007. Швы деталей изделий ровные, без пропусков стежков и не имеют складок и сборок. Концы строчек закреплены, концы нитей не превышают 1,5 см.

5.1.27 Поверхность изделий комплекта не имеет внешних дефектов в виде вмятин, разрывов и других механических повреждений, а также пятен и производственных загрязнений.

5.1.28 Комплект устойчив к воздействию климатических факторов при эксплуатации для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, транспортировании – по условиям хранения набора 2 (С) по ГОСТ 15150-69 и при хранении – по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69.

5.1.29 Плотность материала простыни, комбинезона, халата, рубашки и брюк, бахил, наруканников, фартука, трусов, носков не менее 25 г/м².

5.1.30 Плотность материала накидки, рубашки для рожениц, шапочки, салфетки не менее 17 г/м².

5.1.31 Плотность материала чехла (мешка) патологоанатомического, тапок (кроме подошвы) не менее 35 г/м².

5.2 Описание и принцип работы

Комплект представляет собой комплект из нестерильных одноразовых изделий из нетканого материала обеспечивающий защиту медицинских работников и пациента от перекрестной инфекции (взаимного заражения) при осмотре пациента или проведении медицинских процедур.

5.3 Порядок работы с комплектом:

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению!

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки. В случае обнаружения нарушения упаковки (она не должна быть порванной, вскрытой, мокрой и с посторонними изделиями внутри) необходимо утилизировать комплект и использовать новый.

Вскрыть упаковку, извлечь изделия.

Одежда надевается тщательно, чтобы во время работы не поправлять части одежды, не спеша, соблюдая определённую последовательность: халат и/или комбинезон, бахилы, шапочка-шлем и т.д.

5.3.1 Порядок надевания:

Халата (артикул 1.01, 1.02, 1.03, 1.04):

– Просуньте руки в рукава так, чтобы фиксирующие элементы - завязки, оказались на спине. Полы халата должны заходить одна за другую, чтобы избежать открытых участков одежды.

– Тесьму горловины халата оборачивают и фиксируют на шее.

– По среднему срезу спинки на линии талии закреплены отлетные завязки пояса: завязка продевается в петлю на спинке. Две завязки пояса оберните вокруг талии. Пояс фиксируется спереди халата.

Одевание халата с помощью медицинского работника (помощника).

Помощник достаёт халат и разворачивает его рукавами к себе, краями воротника закрывают кисти рук, хирург одевает руки в рукава халата, опуская руки вниз; надев халат на руки, поднимает их вверх, помощник подходит к хирургу сзади и завязывает внутренние завязки халата, затем и завязывает сзади петли, запахивая полы халата.

Халата (артикул 1.05, 1.06):

– Надеть рукава халата по очереди. Одновременно натягивать оба рукава нельзя: халат может порваться;

– Застегнуть застежки халата.

Для хирургических процедур, где есть большой риск загрязнения любой поверхности тела необходимо применять комбинезон. Для надевания необходимо развернуть комбинезон на вытянутых руках, держа руками по внутренней поверхности комбинезона по очереди поместить ноги в штанины, продеть руки в рукава, надеть капюшон, застегнуть молнию.

Комбинезона (артикулы 3.01, 3.02, 3.03, 3.04):

- Развернуть комбинезон.
- По очереди поместить ноги в штанины нижней части.
- Продеть руки в рукава.
- Надеть капюшон.
- Застегнуть молнию.

Накидка (артикулы 13.00):

Накинуть накидку на спину, завязки должны быть спереди. Завязать зафиксировать между собой

Нарукавники (артикул 10.1, 10.2)

Надеть по очереди на рукава поверх рабочей одежды.

Бахилы (артикул 4.01, 4.02, 4.03, 4.04)

Взять бахилы, развернуть и по очереди надеть на ноги поверх обуви. Для предотвращения сползания бахилы фиксируются завязками сверху или резинкой.

Фартук (артикул 9.01, 9.02)

Одеваем петлю на голову, фиксируем завязками на спине.

Рубашка (артикул 2.01/1)

Надеваем рукава рубашки, затем через горловину надеваем саму рубашку и расправляем её по фигуре.

Брюки (артикул 2.02/2)

Завести ногу, аккуратно отпуская брючину так, так чтобы она не касалась пола.

Шапочка (артикул 6.01)

Шапочка-берет должна закрывать волосистую часть головы. Для более плотного прилегания к голове оснащена резинкой, что обеспечивает комфортное применение для пышных причёсок. Мягкая резинка, расположенная по кругу шапочки-берета, не собирается в складки и надёжно фиксирует шапочку и убранные под нее волосы на голове пользователя, не оставляя следов на лице, даже после длительного ношения.

Шапочка (артикул 6.02)

Шапочка-шлем должна закрывать волосистую часть головы и шею, открыто только лицо, по внешнему краю лицевой области фиксируется резинкой.

Шапочка (артикул 6.03)

Шапочка-колпак должна закрывать волосистую часть головы. Для плотного прилегания к голове фиксируется завязками.

Тапки (артикул 7.02)

Надеть по очереди на каждую ногу.

Рубашка для рожениц (артикул 8.00)

Надеваем рукава рубашки, затем через горловину надеваем саму рубашку и расправляем её по фигуре.

Носки (артикул 7.01)

Надеть по очереди на каждую ногу.

Трусы (артикул 5.01; 5.02)

Надевает пациент перед процедурами или медицинский работник помогает одеть пациенту

Салфетки (артикул Б15.01; Б15.02; Б15.03; Б15.04; Б15.05)

Салфетка предназначена для обтирания или высушивания неповрежденной кожи пациентов (изделие не используется для обработки ран); очищения предметов в помещении (например, в случае разлития жидкости); для использования в качестве подстилочного материала для поддержания гигиены и предотвращения загрязнения физиологическими жидкостями медицинского персонала и пациента

Простыня (артикул Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06)

Простыня предназначена для покрытия матраца кровати и/или участка тела пациента во время осмотра или медицинской процедуры для предотвращения загрязнения/перекрестного заражения; изделие не предназначено для использования во время хирургических операций.

Чехол (мешок) патологоанатомический (артикул 12.00)

Чехол (мешок) патологоанатомический предназначен для транспортировки и хранения тел умерших (погибших) в течение непродолжительного срока. Как правило, до момента доставки в морг.

5.3.2 Порядок снятия одежды и белья:

Изделия из комплекта после работы снимают в специально выделенном для этого помещении. Перед снятием руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор на 1 – 2 минуты.

Халата (артикул 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06):

Развязать все завязки или расстегнуть все застёжки на халате. Снять халат с шеи и плеч, касаясь только внутренней части халата. Вывернуть халат наизнанку, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Комбинезона (артикулы 3.01, 3.02, 3.03, 3.04):

Расстёгивают молнию, снимают капюшон, снимают рукава и не касаясь наружной поверхности снимают нижнюю часть, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Накидка (артикулы 13.00),

Развязать завязки, снять накидку, выворачивая двумя руками наружную поверхность вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Нарукавники (артикул 10.1, 10.2)

Снимаем поочередно с правой и левой руки. Складываем верхней частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Бахилы (артикул 4.01, 4.02, 4.03, 4.04)

Развязываем завязки (при наличии), снимаем поочередно правую и левую ногу, сворачивая их наружной стороной вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Фартук (артикул 9.01, 9.02)

Развязать завязки, снять фартук через голову, завернуть наружную его часть внутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Рубашка (артикул 2.01/1)

Правой рукой держим левый рукав. Захватываем рукава рубашки, поочередно вытягиваем вперед. Наклоняем туловище вперед, вытягиваем руки, поочередно стягивая каждый рукав вперед, снимая рубашку через горловину. Складываем рубашку наружной стороной внутрь. затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Брюки (артикул 2.02/2)

Снимаем поочередно с правой и левой ноги, не касаясь поверхности кожи. Выворачиваем брюки наружной стороной вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Шапочка (артикул 6.01)

Снимаем шапочку. Складываем шапочку наружной частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Шапочка (артикул 6.02)

Рукой за верхнюю часть шлема вытягиваем наверх. Складываем шапочку наружной частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Шапочка (артикул 6.03)

Развязываем завязки. Снимаем шапочку. Складываем шапочку наружной частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Тапки (артикул 7.02)

Снять по очереди с каждой ноги.

Рубашка для рожениц (артикул 8.00)

Правой рукой держим левый рукав. Захватываем рукава рубашки, поочередно вытягиваем вперед. Наклоняем туловище вперед, вытягиваем руки, поочередно стягивая каждый рукав вперед, снимая рубашку через горловину. Складываем рубашку наружной стороной внутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Носки (артикул 7.01)

Снимаем носки по очереди, чтобы внутренняя сторона оказалась снаружи, а наружная – внутри, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Трусы (артикул 5.01, 5.02)

Снять трусы, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Салфетки (артикул Б15.01; Б15.02; Б15.03; Б15.04; Б15.05)

Положить использованную салфетку в ёмкость для отходов класса Б, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Простыня (артикул Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06)

Положить использованную простыню в ёмкость для отходов класса Б, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Комплект после эксплуатации подвергнуть утилизации (уничтожению) в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684 -21

5.3.3 Периодичность снятия и замены одежды и белья

Снятие и замена одежды должны производиться не реже 1 раза в смену, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями или выделениями пациентов – незамедлительно.

Снятие и замена постельного белья производиться не реже 1 раза в смену, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями или выделениями пациентов – незамедлительно.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в влагонепроницаемых перчатках одноразовых (при медицинских манипуляциях) или многократного применения. Дезинфицирующие средства хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкции по его применению.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 19.

Таблица 19 – Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Один вариант исполнения комплекта	1

Снимаем шапочку. Складываем шапочку наружной частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Шапочка (артикул 6.02)

Рукой за верхнюю часть шлема вытягиваем вверх. Складываем шапочку наружной частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Шапочка (артикул 6.03)

Развязываем завязки. Снимаем шапочку. Складываем шапочку наружной частью вовнутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Тапки (артикул 7.02)

Снять по очереди с каждой ноги.

Рубашка для рожениц (артикул 8.00)

Правой рукой держим левый рукав. Захватываем рукава рубашки, поочередно вытягиваем вперед. Наклоняем туловище вперед, вытягиваем руки, поочередно стягивая каждый рукав вперед, снимая рубашку через горловину. Складываем рубашку наружной стороной внутрь, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Носки (артикул 7.01)

Снимаем носки по очереди, чтобы внутренняя сторона оказалась снаружи, а наружная – внутри, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Трусы (артикул 5.01, 5.02)

Снять трусы, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором

Салфетки (артикул Б15.01; Б15.02; Б15.03; Б15.04; Б15.05)

Положить использованную салфетку в ёмкость для отходов класса Б, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Простыня (артикул Б13.01, Б13.02, Б13.03, Б13.04, Б13.05, Б13.06)

Положить использованную простыню в ёмкость для отходов класса Б, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Комплект после эксплуатации подвергнуть утилизации (уничтожению) в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.3684 -21

5.3.3 Периодичность снятия и замены одежды и белья

Снятие и замена одежды должны производиться не реже 1 раза в смену, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями или выделениями пациентов – незамедлительно.

Снятие и замена постельного белья производиться не реже 1 раза в смену, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями или выделениями пациентов – незамедлительно.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в влагонепроницаемых перчатках одноразовых (при медицинских манипуляциях) или многократного применения. Дезинфицирующие средства хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкции по его применению.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать таблице 22.

Таблица 19 – Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Один вариант исполнения комплекта	1

2	Инструкция по применению	1 шт. в транспортную тару
---	--------------------------	---------------------------

7 МАРКИРОВКА

7.1 На этикетке, помещаемой внутри упаковки, нанесена типографским способом маркировка, содержащая:

- полное наименование медицинского изделия;
- наименование варианта исполнения комплекта;
- наименование производителя;
- адрес производителя;
- состав комплекта;
- обозначение ТУ 32.50.50-005-10713095-2021;
- номер партии;
- вариант исполнения изделий комплекта;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- дату изготовления (месяц, год);
- срок годности изделия;
- условия хранения;
- символ «Нестерильно»;
- символ «Запрет на повторное применение»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света».

7.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги», «Не допускать воздействия солнечного света».

В маркировке, нанесенной на транспортную упаковку, указана маркировка в соответствии с п 7.1 с дополнением:

- количество потребительских упаковок.

7.3 Допускается нанесение символов, используемых для медицинских изделий в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

8 УПАКОВКА

8.1 Комплект упаковывают в потребительскую упаковку – в пакет из пленки полиэтиленовой марки Н по ГОСТ 10354-82, или из пленки полипропиленовой марки НОН.

8.2 Потребительские упаковки укладывают в транспортную упаковку - в ящики, из картона коробочного по ГОСТ 7933-89, ГОСТ 9142-2014 или из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901-2007.

8.3 Потребительская упаковка герметична

8.4 Транспортная тара оклеена лентой по ГОСТ 18251-87 или ГОСТ 20477-86.

8.5 Эксплуатационная документация вложена в транспортную тару вместе с комплектом.

8.6 Масса брутто транспортной упаковки не более 15 кг.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 Перед использованием прочесть инструкцию по применению.

9.2 Эксплуатация комплекта должна производиться в соответствии с «Инструкцией по применению».

9.3 Использовать комплект строго по назначению.

9.4 Комплект одноразового применения, техническое обслуживание и ремонт не требуется.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

10.1 Показание к применению – обеспечение защиты медицинских работников и пациента от перекрестной инфекции (взаимного заражения) при осмотре пациента или проведении медицинских процедур.

10.2 Противопоказание – не применять комплект не по назначению, не использовать поврежденные изделия.

10.3 Возможные побочные эффекты – при индивидуальной непереносимости материалов, возможно развитие аллергической реакции.

11 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

11.1 При работе следует соблюдать меры предосторожности.

11.2 Перед использованием необходимо тщательно изучить инструкцию по эксплуатации

11.3 Запрещается повторное использование изделий комплекта. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделий комплекта, необходимых для их использования по назначению.

11.4 Комплект с истекшим сроком годности – утилизировать.

12 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

12.1 Транспортирование

12.1.1 Транспортировать комплект следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

12.1.2 Условия транспортирования комплектов крытыми транспортными средствами в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69:

– температура от минус 50 до плюс 40°C;

– относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

12.2 Хранение

12.2.1 Комплект в упаковке изготовителя следует хранить на складах. Коробки должны укладываться в устойчивые штабеля. Высота штабеля не должна быть более 2,0 м. Комплекты в рваной и неисправной коробке укладывать в штабеля запрещается.

12.2.2 Хранение должно осуществляться в помещениях без сквозняков с источниками дневного или искусственного света. Само место хранения должно быть удалено от источника тепла как минимум на 1 метр. Избегать попадания прямых ультрафиолетовых лучей.

12.2.3 Воздух помещения для хранения комплектов не должен содержать пары кислот и щелочей.

12.2.4 Комплекты в упаковке производителя должны храниться по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

– температура от плюс 5°C до плюс 40°C;

– относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 25°C.

13 СВЕДЕНИЯ ОБУТИЛИЗАЦИИ (УНИЧТОЖЕНИИ)

13.1 Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

13.2 Комплект после использования его по назначению подлежит утилизации. Повторно использовать запрещается. Дезинфекция комплекта после его использования возможна автоклавированием, камерным и химическими методами. Продезинфицированный комплект подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

13.3 Использованные по назначению изделия из комплекта утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

13.4 Комплекты, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируются как бытовые отходы.

13.5 Изделия из комплекта должны быть собраны и переданы специальным лицензированным организациям, занимающимся утилизацией медицинских отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

14 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14.1 Основным видом опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха, населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия или вне его, а также произвольной свалки для этих целей местах.

14.2 При утилизации отходов, а также при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ 17.1.3.13-86, ГОСТ 17.2.3.01-86 и ГОСТ Р 59061-2020.

14.3 Требования по ресурсосбережению – по ГОСТ 30772-2001.

14.4 Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

14.5 Предельно-допустимые концентрации выбрасываемых в атмосферу веществ не должны превышать значений, установленных по МУ 2.1.7.730-99 и в нормативной документации по конкретным веществам.

14.6 Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – по ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 1.2.3685-21.

14.7 При производстве продукции предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ 12.1.005-88.

14.8 Требования к обеспечению пожарной безопасности помещений должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91.

При возникновении пожара тушить всеми известными средствами пожаротушения. Производственные помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием.

15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ 2.114-2016 «ЕСКД. Технические условия»;
 - ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД Основные надписи»;
 - ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам»;
 - ГОСТ 23193-78 «Изделия швейные бытового назначения. Допуски»;
 - ГОСТ 3811-72 «Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей»;
 - ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов»;
 - ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. Правила приемки»;
 - ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»;
 - ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;
 - ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности»;
 - ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
 - ГОСТ 6309-93 «Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия»;
 - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды»;
 - ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования»;
 - ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;
 - ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;
 - ГОСТ 7933-89 «Картон для потребительской тары. Общие технические условия»;
 - ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия»;
 - ГОСТ Р 52901-2007 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»;
 - ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»;
 - ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия»;
 - ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»;
 - ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;
 - ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия»;
 - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод.
- Термины и определения»;**

– ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения»;

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;

– ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;

– ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;

– МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»;

– ГОСТ 12.1.005-88

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;

– Приказ Минздрава России № 4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

16 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям
ТУ 32.50.50-005-10713095-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортирования и хранения.

16.2 Гарантийный срок годности – 5 лет с даты изготовления

17 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Комплект соответствует ТУ 32.50.50-005-10713095-2021 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____ Дата изготовления _____

18 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются по адресу предприятия-изготовителя:


Россия, 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, оф.16,
тел.: +7(4932) 34-62-12, e-mail: nita-mo@yandex.ru, ООО «НИТА»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

22 листа(ов)

Генеральный директор ООО «НИТА»

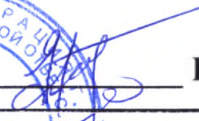


Горшененко Н.Ю.