

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия.

**Набор презервативов из натурального латекса текстурированных
Contex® Relief.**

В составе набора:

- 1. Презервативы из натурального латекса текстурированные
Contex® Dotted - с точечной структурой;**
- 2. Презервативы из натурального латекса текстурированные
Contex® Ribbed - с ребристой структурой.**

Презервативы из натурального латекса текстурированные Contex®

Dotted – с точечной структурой.

1. В свёрнутом виде.



3. В развёрнутом виде.



3. В первичной упаковке:



DOTTED

LOT XXXXXXXXXXXX

XXXX ☞ EXP YYYY-MM

Презервативы из натурального латекса текстурированные Contex®

Ribbed – с ребристой структурой.

1. В свёрнутом виде.



2. В развёрнутом виде.



3. В первичной упаковке:



Contex®

RIBBED
LOT XXXXXXXXXX
XXXX ⌚ EXP YYYY-MM



Набор презервативов из натурального латекса текстурированных Contex® Relief (Релиф). 12 презервативов в силиконовой смазке для дополнительной стимуляции. В набор входят:

6 презервативов из натурального латекса текстурированных Contex® Dotted (Доттэд) – с точечной структурой. Бесцветные, прямой формы, с точками, с накопителем. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 52 мм.

6 презервативов из натурального латекса текстурированных Contex® Ribbed (Рибд) – с ребристой структурой. Коралловые, прямой формы, с ребрами, с накопителем. Номинальные размеры: длина – 180 мм, ширина – 53 мм.

Смазка не разрушает сперматозоиды. Без неприятного запаха. Наши презервативы разработаны так, чтобы не иметь неприятного запаха.

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию на внутренней стороне упаковки!

Проверены электроникой. Только для одноразового использования.

Входящие в состав набора Contex® Relief (Релиф) презервативы являются средством предотвращения нежелательной беременности и профилактики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в т. ч. ВИЧ-инфекции. Никакое из средств контрацепции не может гарантировать 100% защиты от нежелательной беременности, ВИЧ-инфекции или ЗППП.

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 0 до 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Производитель: «Рекитт Бенкизер Хелскээр (ЮК) Лтд.», 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство.

Страна происхождения: Таиланд.

Импортёр/уполномоченная организация: ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20;

адрес электронной почты: ConsumerHealth_RU@reckitt.com

Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, оф. 166; адрес электронной почты: ConsumerHealth_BY@reckitt.com

Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Сэльвин», 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 14, эт. 4, каб. 37.



00000000



ISO 4074

CONTEX® RELIEF CONDOMS

LOT/Номер партии

Per. уд. №

EXP/Годен до (гггг-мм)

5. Маркировка на внутренней стороне вторичной/потребительской упаковки набора(обязательная информация)

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива перед использованием. Если индивидуальная упаковка повреждена, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель, надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить данный презерватив и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или его чрезмерного сжатия пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Презервативы могут предоставлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презервативы предназначены только для однократного использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые


пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива, если чувствуется дискомфорт или раздражение во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100 % защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.

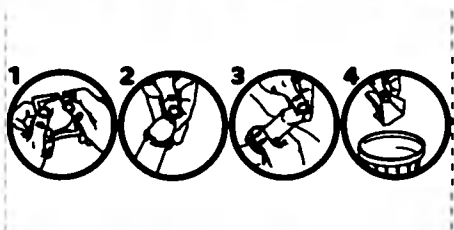

Дата последней редакции инструкции:

всего прошито и скреплено
печатью 13 лист 08

