

Юридический адрес: 125362, г. Москва,

вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

ИНН: 7734436770 КПП: 773401001 ОГРН: 1207700316064 ОКПО: 45422980

Р/с: 40702810002370005084 К/с: 30101810200000000593

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**Перчатки медицинские латексные диагностические (смотровые) нестерильные, неопудренные по ТУ 22.19.60-019-45422980-2021 в вариантах исполнения****Назначение**

Перчатки предназначены для создания защитного барьера при ношении медицинскими работниками во время диагностики/лечения пациента.

Показания к применению

Перчатки необходимо применять для создания защитного барьера при ношении медицинскими работниками во время диагностики/лечения пациента.

Противопоказания

Аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав изделия, гиперчувствительность.

Побочные действия

Возможна аллергическая реакция на материалы изготовления изделия. При появлении симптомов: кожного зуда, покраснения, отека, сыпи - прекратить контакт с аллергеном.

Потенциальный потребитель:

Медицинские работники.

Вид и длительность контакта изделия с организмом человека:

Кратковременный (менее 24 ч.) контакт с неповрежденной кожей

Перчатки состоят из натурального латекса.

Порядок и условия применения:

Перед применением перчаток необходимо убедиться в целостности упаковки. Затем вскрыть внешнюю упаковку. Для того чтобы открыть внутреннюю упаковку и достать перчатки и использовать их по назначению, необходимо обработать руки.

- 1) Взять перчатки нужного размера.
- 2) При надевании перчаток медицинских смотровых не должно прилагаться больших усилий.

Рекомендуемая длительность ношения перчаток не более 2 часов.

Основные характеристики:

Размеры перчаток в точках, показанных на рисунке 1 должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

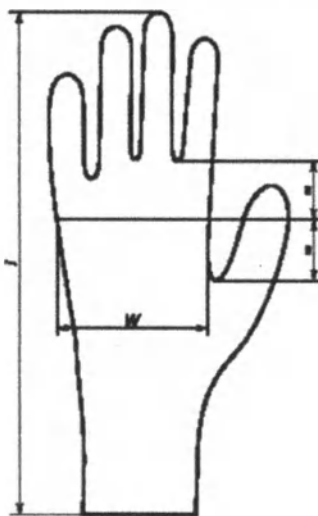


Рисунок 1 — Точки для измерения ширины и длины перчатки

Перчатки должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Код размера	Ширина, мм	Наглядный размер	Ширина по наглядному размеру, мм	Длина, мм не менее	Толщина, мм, не менее	Толщина (точно в центре ладони), мм не более
6 и менее	≤ 82	Сверхмалые (X-S)	≤ 80	220	текстурированная поверхность - 0,11	текстурированная поверхность - 0,23
6 1/2	83±5	Маленькие (S)	80±10	220		
7	89±5	Средние (M)	95±10	230		
7 1/2	95±5			230		
8	102±6	Большие (L)	110±10	230	текстурированная поверхность - 0,11	текстурированная поверхность - 0,23
8 1/2	109±6			230		
9 и более	≥ 110	Сверхбольшие (X-L)	≥ 110	230		

Комплектность

Состав поставки изделия должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование	Количество
1.1	Перчатки медицинские латексные диагностические (смотровые) нестерильные, неопудренные, размер XS	50 штук или 100 штук или 200 штук в упаковке
1.2	Перчатки медицинские латексные диагностические (смотровые) нестерильные, неопудренные, размер S	50 штук или 100 штук или 200 штук в упаковке
1.3	Перчатки медицинские латексные диагностические (смотровые) нестерильные, неопудренные, размер M	50 штук или 100 штук или 200 штук в упаковке
1.4	Перчатки медицинские латексные диагностические (смотровые) нестерильные, неопудренные, размер L	50 штук или 100 штук или 200 штук в упаковке
1.5	Перчатки медицинские латексные диагностические (смотровые) нестерильные, неопудренные, размер XL	50 штук или 100 штук или 200 штук в упаковке
2	Инструкция по применению (ИПП 22.19.60-019-45422980-2021)	1 шт в упаковке

Символы на маркировке

	Не использовать при повреждении упаковки		Содержит натуральный латекс
	Нестерильно		Запрет на повторное применение

Меры предосторожности

Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению. Хранить в сухом, недоступном для детей месте. Применять только по назначению и не позднее срока годности.

Хранение и транспортирование

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 20790 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортировка изделия должна соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение

Хранение изделие должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Изделия подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент утилизации.

Непригодные к эксплуатации перчатки относятся к классу А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО) и не требуют каких-либо специальных мер предосторожности при

уничтожении (утилизации) согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Использованные перчатки могут относиться к классу Б - инфицированные и потенциально инфицированные отходы и требуют специальных мер предосторожности при уничтожении (утилизации) согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения составляет пять (5) лет с даты изготовления.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Витекс» (ООО «Витекс»)

125362, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ул. Тушинская, д. 11, помещ. 2п

+7 495 796 78 70

sale@vitex.farm

Генеральный директор ООО «Витекс»:



Веселова О.А.

Прошито, пронумеровано и
креплено печатью



ВИТЕКС
МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

лист (9)

Генеральный директор

Веселова О.А.