

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ортоника»



Титаренко Ю.А.

«27» декабря 2024 г.

ПАСПОРТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, РФ

КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ORTONICA ПО
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:

КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ БАЗОВОЕ
ORTONICA BASE LITE 1000

ПАСПОРТ

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

2024

Линия отреза при поставке на экспорт

С _____
Кресло – коляска с ручным
приводом складное Ortonica
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024
вариант исполнения:
Кресло – коляска с ручным приводом
складное базовое Ortonica Base Lite 1000
№ _____
Номер изделия

код ОКП

Паспорт
66445146.942815.10.000.00.00 ПС

ФНН

2024 г

Перв. примен.	1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	1.1 Сведения об изделии 1.1.1 Кресло – коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000 (далее по тексту – кресло - коляска). 1.1.2 Разработчик и производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника» (ООО «Ортоника»), Юридический адрес: 301600, Российская Федерация, Тульская область, муниципальный район Узловский, городское поселение город Узловая, город Узловая, улица Гагарина, дом 16, офис 116 Тел: +7 (495) 648-60-42, e-mail: info@ortonica.ru, Адрес места производства: 394026, Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Московский, дом 11/40.				
Справ. №					
Подп. и дата.					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

66445146.942815.10.000.00.00 ПС				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Майорова		22.12.24
Пров.		Хохлова		22.12.24
Н.контр.		Белякова		22.12.24
Утв.		Титаренко		22.12.24

Кресло - коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000 Паспорт		
Лит.	Лист	Листов
0 0	2	16
ООО «ОРТОНИКА»		

1.2 Технические данные

Наименование показателя	Значение
1 Габаритная ширина кресла -коляски, ± 10 мм	590, 620, 650, 675, 700, 730, 745, 775, 795, 820
2 Ширина сиденья, ± 10 мм*	380, 405, 430, 455, 480, 505, 530, 560, 585, 610
3 Эффективная ширина сиденья, ± 10 мм	390, 410, 440, 460, 490, 510, 535, 565, 590, 615
4 Угол наклона плоскости сиденья, $\pm 5^{0**}$	минус 10/ +10
5 Габаритная высота кресла -коляски, ± 10 мм**	840-1050
6 Полная габаритная длина кресла - коляски, ± 10 мм	1190
7 Ширина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	330
8 Высота кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	710, 710, 730, 750, 775, 795, 820, 845, 865, 895
9 Длина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	840 (размер 1-6); 875 (размер 7-10)
10 Эффективная глубина сиденья, ± 10 мм**	430-530 (размер 1-6); 465-540 (размер 7-10)
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4 (размер 1-6); 3 (размер 7-10)
Кол-во положений	5 (размер 1-6); 4 (размер 7-10)
11 Высота сиденья, ± 10 мм**	460-500
Кол-во шагов	3
Кол-во положений	4
12 Высота спинки, ± 15 мм**	410-510
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
13 Угол наклона спинки, $\pm 1^{0**}$	90
Шаг регулировки, угол ⁰	-
Кол-во шагов	-
Кол-во положений	-
14 Расстояние между подголовником и спинкой, ± 10 мм	150/80
15 Высота подлокотника, ± 5 мм**	225-255 (тип 01); 240-310 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	15 (тип 01); 10 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 7 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 8 (тип 02)
16 Расстояние от переднего края подлокотника до спинки, ± 10 мм	280/390 (тип 01); 310/420 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	55 (тип 01) 36,5 (тип 02)

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист

3

Имя Лист № докум. Подл. Дата

Копировал

Формат А4

Кол-во шагов	2 (тип 01); 3 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 4 (тип 02)
17 Масса нетто, кг, не более	25,0
18 Масса брутто, кг, не более	30,0
19 Масса самой тяжелой части кресла – коляски (рамы), кг, не более	12
20 Максимальная масса пользователя, кг	125 (размер 1-6); 150 (размер 7-10)
21 Механическая нагрузка, Н	1250 (размер 1-6); 1500 (размер 7-10)
22 Высота препятствия с грузом, мм, не более	40
23 Длина подножки, ± 10 мм:	
- тип 01, 02**;	340-480
- тип 03**;	410-440
- тип 04**.	350-500
Тип регулировки:	
- тип 01, 02;	плавная
- тип 03, 04.	ступенчатая
Кол-во шагов:	
- тип 03;	1
- тип 04.	7
Кол-во положений:	
- тип 03;	2
- тип 04.	8
24 Угол наклона подножки к поверхности сиденья, ± 100	
- тип 01, 02, 03;	110
- тип 04**.	114-180
25 Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	530
26 Диаметр ведущего (фиксированного) колеса, ± 10 мм	600
27 Диаметр самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	200
28 Диапазон регулирования переднего колеса по вертикали, ± 10 мм	43 (размер 1-9); 54 (размер 10)
Шаг регулировки, мм	14 (размер 1-9); 27 (размер 10)
Кол-во шагов	4/3 рабочих (размер 1-9); 2 (размер 10)
Кол-во положений	5/4 рабочих (размер 1-9); 3 (размер 10)
29 Вертикальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	100
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист

4

Копировал

Формат А4

30 Горизонтальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	120
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	6
Кол-во положений	7
31 Ширина колеи самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	455, 455, 480, 505, 530, 560, 575, 605, 630, 650
32 Ширина колеи приводных колес, ± 10 мм	540, 540, 565, 585, 615, 620, 660, 680, 705, 730
33 Клиренс загруженного кресла – коляски, мм, не менее	30

* Размерный ряд кресла - коляски соответствует ширине сиденья:

размер 1 – 380 мм;
размер 2 – 405 мм;
размер 3 – 430 мм;
размер 4 – 455 мм;
размер 5 – 480 мм;
размер 6 – 505 мм;
размер 7 – 530 мм;
размер 8 – 560 мм;
размер 9 – 585 мм;
размер 10 – 610 мм.

** Регулировка осуществляется в пределах указанного диапазона.

Име. № пода.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист

5

Копировал

Формат А4

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000 в составе:

2.1 Кресло - коляска Ortonica Base Lite 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1 шт. в составе:

2.1.1 Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 - 1 шт. (при необходимости).

2.1.2 Сиденье – 1 шт.

2.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

2.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

2.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 – 1 шт. (при необходимости).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	66445146.942815.10.000.00.00 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата		

- 2.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).
- 2.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).
- 2.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):
- распорка для жесткости тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
 - распорка для жесткости тип 02 – 1 шт. (при необходимости).
- 2.6 Подножка в вариантах исполнения:
- подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).
- 2.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):
- подголовник тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
 - подголовник тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
 - подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
 - подголовник тип 04 – 1 шт. (при необходимости).
- 2.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).
- 2.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:
- антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).
- 2.10 Абдуктор – 1 шт. (при необходимости).
- 2.11 Набор инструментов, в составе:
- гаечный ключ – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.
- 2.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):
- механический – 1 шт.;
 - механический с манометром – 1 шт.
- 2.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт.;
 - подушка для спинки тип 02 – 1 шт.
- 2.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.
- 2.15 Жесткое основание для сиденья – 1 шт. (при необходимости).
- 2.16 Жесткое основание для спинки – 1 шт. (при необходимости).
- 2.17 Ремень для фиксации голени – 1 шт. (при необходимости).
- 2.18 Ремень для фиксации стоп – 1 шт. (при необходимости).
- 2.19 Фиксатор стопы – 2 шт. (при необходимости).

Изм. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист
7

- 2.20 Столик – 1 шт. (при необходимости).
- 2.21 Защитный колпак на спицы – 2 шт. (при необходимости).
- 2.22 Поясничная валик – 1 шт. (при необходимости).
- 2.23 Тростедержатель – 1 шт. (при необходимости).
- 2.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса – 2 шт. (при необходимости).
- 2.25 Рюкзак – 1 шт. (при необходимости).
- 2.26 Подставка - подушка для ног – 1 шт. (при необходимости).
- 2.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 2.28 Паспорт – 1 шт.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лист
					66445146.942815.10.000.00.00 ПС					8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Копировал

Формат А4

3 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие - изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

3.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

3.4 При покупке товара необходимо контролировать правильное заполнение гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи.

3.5 Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3.6 В случае обнаружения неисправностей в кресле - коляске в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

3.7 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

3.8 Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло - коляску вплоть до замены ее в целом, если за этот срок кресло - коляска выйдет из строя или ухудшатся ее характеристики, установленные настоящими техническими условиями.

3.9 Предприятие - изготовитель не несет ответственности в случае повреждений кресла - коляски, возникших из-за неправильной эксплуатации:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящем руководстве по эксплуатации;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломок деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезда на препятствия высотой более 40 мм;
- перемещений в кресле - коляске на спущенных шинах;
- проколах камер в шинах колес и т.п.

3.10 Гарантийные обязательства не распространяются на части кресла - коляски, подверженные естественному износу, такие как покрышки, камеры покрышек, текстильные элементы.

3.11 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисный центр компании производителя.

3.12 Срок службы кресла - коляски – 6 лет.

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист

9

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

Копировал

Формат А4

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, соответствует ТУ 30.92.20-018-66445146-
2018 и признана годной для эксплуатации.

Параметры и характеристики кресла - коляски с ручным приводом
складного Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 в варианте исполнения
_____, серийный номер _____, приведены в приложении А.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Изм. №	№	Подп.	и	дата		Изм. №	№	Подп.	и	дата	
Изм. №	№	Подп.	и	дата		Изм. №	№	Подп.	и	дата	
Изм. №	№	Подп.	и	дата		Изм. №	№	Подп.	и	дата	
Изм. №	№	Подп.	и	дата		Изм. №	№	Подп.	и	дата	
					66445146.942815.10.000.00.00 ПС						Лист
											11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Копировал

Формат А4

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Перед началом эксплуатации извлеките составные части кресла - коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений.

6.2 Кресло - коляска должно быть укомплектовано согласно раздела 2.

6.3 Монтаж и необходимые регулировки осуществляются с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию кресла - коляски.

6.5 При посадке пользователя в кресло - коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставлять на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должны быть подняты в вертикальное положение.

6.6 Запрещается эксплуатация кресла - коляски с неисправными тормозами.

6.7 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.8 Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло - коляску и оценивать управление креслом - коляской собственными силами. Для парковки должны быть использованы тормоза на колесах кресла - коляски.

6.9 Кресло - коляска складывается и раскладывается без использования инструмента.

6.10 Кресло - коляска поставляется в сложенном виде. Для раскладывания кресла - коляски необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.11 Высота опор для ног должны быть отрегулированы по длине голени.

6.12 Устройство, предохраняющее от опрокидывания, должно быть отрегулировано по высоте.

6.13 Перед использованием кресла - коляски требуется проверка давления в пневматических шинах: для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.

6.14 Для складывания кресла - коляски опоры для ног требуется поднять в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

6.15 Для посадки спереди следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
- сложить вверх подножки;
- при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;
- опустить вниз подножки и поставить на них ноги;
- пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.16 Для посадки с боковой стороны следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист

12

7 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя, кресло - коляска подлежит утилизации. Допускается утилизация кресла - коляски вместе с бытовыми отходами. Кресло - коляска относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, СанПиН 2.1.3684-21).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.	66445146.942815.10.000.00.00 ПС					Лист
											14
Име.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Копировал

Формат А4

8 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание кресла - коляски могут выполняться исключительно в сервис - центре компании ООО «Ортоника». Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла - коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре или у Вашего регионального представителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: service@ortonica.ru.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист
15

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.10.000.00.00 ПС

Лист

16

**КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ORTONICA ПО
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024**

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:

**КРЕСЛО - КОЛЯСКА С ОДНОСТОРОННИМ РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
(ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОЙ РУКОЙ) СКЛАДНОЕ БАЗОВОЕ
ORTONICA CONTROL ONE 1000**

ПАСПОРТ

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

2024

Линия отреза при поставке на экспорт

С

**Кресло – коляска с ручным
приводом складное Ortonica
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024
вариант исполнения:**

**Кресло – коляска с односторонним
ручным приводом (для управления
одной рукой) складное
Ortonica Control One 1000**

№

Номер изделия

код ОКП

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

ФИН

2024 г

Паспорт

Перв. присл. №	1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.1 Сведения об изделии 1.1.1 Кресло – коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения: Кресло - коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000 (далее по тексту – кресло - коляска). 1.1.2 Разработчик и производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника» (ООО «Ортоника»), Юридический адрес: 301600, Российская Федерация, Тульская область, муниципальный район Узловский, городское поселение город Узловая, город Узловая, улица Гагарина, дом 16, офис 116. Тел: +7 (495) 648-60-42, e-mail: info@ortonica.ru, Адрес места производства: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, д.11.									
	Справ. №									
Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Инв. № подл.						66445146.942815.20.000.00.00 ПС				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кресло - коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000 Паспорт				
					Лит.	Лист	Листов			
					О О ₁	2	15			
					ООО «ОРТОНИКА»					

1.2 Технические данные

Наименование показателя	Значение
1 Габаритная ширина кресла -коляски, ± 10 мм	615, 630, 665, 680, 720, 740
2 Ширина сиденья, ± 10 мм*	380, 405, 430, 455, 480, 505
3 Эффективная ширина сиденья, ± 10 мм	390, 410, 440, 460, 490, 510
4 Угол наклона плоскости сиденья, $\pm 5^{\circ}$ **	минус 10/ +10
5 Габаритная высота кресла -коляски, ± 10 мм**	855-1055
6 Полная габаритная длина кресла - коляски, ± 10 мм	1190
7 Ширина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	345
8 Высота кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	720, 720, 740, 745, 770, 795
9 Длина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	840
10 Эффективная глубина сиденья, ± 10 мм**	430-530
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
11 Высота сиденья, ± 10 мм**	460-500
Кол-во шагов	3
Кол-во положений	4
12 Высота спинки, ± 15 мм**	410-510
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
13 Угол наклона спинки, $\pm 1^{\circ}$ **	90
Шаг регулировки, угол ⁰	-
Кол-во шагов	-
Кол-во положений	-
14 Расстояние между подголовником и спинкой, ± 10 мм	150/80
15 Высота подлокотника, ± 5 мм**	225-255 (тип 01); 240-310 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	15 (тип 01); 10 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 7 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 8 (тип 02)
16 Расстояние от переднего края подлокотника до спинки, ± 10 мм	280/390 (тип 01); 310/420 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	55 (тип 01) 36,5 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 3 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 4 (тип 02)
17 Масса нетто, кг, не более	25,0
18 Масса брутто, кг, не более	30,0
19 Масса самой тяжелой части кресла – коляски (рамы), кг, не более	12

Подп. и дата

Име. не дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Име. не подл.

Ис	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист

3

Копировал

Формат А4

20 Максимальная масса пользователя, кг	125
21 Механическая нагрузка, Н	1250
22 Высота препятствия с грузом, мм, не более	40
23 Длина подножки, ± 10 мм:	
- тип 01, 02**;	340-480
- тип 03**;	410-440
- тип 04**.	350-500
Тип регулировки:	
- тип 01, 02;	плавная
- тип 03, 04.	ступенчатая
Кол-во шагов:	
- тип 03;	1
- тип 04.	7
Кол-во положений:	
- тип 03;	2
- тип 04.	8
24 Угол наклона подножки к поверхности сиденья, ± 100	
- тип 01, 02, 03;	110
- тип 04**.	114-180
25 Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	450/530
26 Диаметр ведущего (фиксированного) колеса, ± 10 мм	600
27 Диаметр самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	200
28 Диапазон регулирования переднего колеса по вертикали, ± 10 мм	43
Шаг регулировки, мм	14
Кол-во шагов	4/3 рабочих
Кол-во положений	5/4 рабочих
29 Вертикальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	100
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
30 Горизонтальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	120
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	6
Кол-во положений	7
31 Ширина колен самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	455, 455, 480, 505, 530, 560
32 Ширина колен приводных колес, ± 10 мм	540, 540, 565, 585, 615, 620
33 Клиренс загруженного кресла – коляски, мм, не менее	30

Изм. № подл.	Подп. и дата
Изм. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист

4

Копировал

Формат А4

* Размерный ряд кресла - коляски соответствует ширине сиденья:

размер 1 – 380 мм;
 размер 2 – 405 мм;
 размер 3 – 430 мм;
 размер 4 – 455 мм;
 размер 5 – 480 мм;
 размер 6 – 505 мм;
 размер 7 – 530 мм;
 размер 8 – 560 мм;
 размер 9 – 585 мм;
 размер 10 – 610 мм.

** Регулировка осуществляется в пределах указанного диапазона.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист

5

Копировал

Формат А4

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения: Кресло - коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000 в составе:

2.1 Кресло - коляска Ortonica Control One 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1 шт. в составе:

2.1.1. Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 - 1 шт. (при необходимости).

2.1.2 Сиденье – 1 шт.

2.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости),
- подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

2.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

2.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

2.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 – 1 шт. (при необходимости).

2.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).

2.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).

2.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):

- распорка для жесткости тип 01 – 1 шт.;
- распорка для жесткости тип 02 – 1 шт.

2.6 Подножка в вариантах исполнения:

- подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	
Ив. № подл.	

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата
Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата
Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата
Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист

6

– подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

2.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):

– подголовник тип 01 – 1 шт.;

– подголовник тип 02 – 1 шт.;

– подголовник тип 03 – 1 шт.;

– подголовник тип 04 – 1 шт.

2.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).

2.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:

– антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).

2.10 Абдуктор -1 шт. (при необходимости).

2.11 Набор инструментов, в составе:

– гаечный ключ – 1 шт.;

– ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.

2.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):

– механический – 1 шт.;

– механический с манометром – 1 шт.

2.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для спинки тип 01 - 1 шт.;

– подушка для спинки тип 02 - 1 шт.

2.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.

2.15 Жесткое основание для сиденья (при необходимости) – 1 шт.

2.16 Жесткое основание для спинки (при необходимости) – 1 шт.

2.17 Ремень для фиксации голени (при необходимости) – 1 шт.

2.18 Ремень для фиксации стоп (при необходимости) – 1 шт.

2.19 Фиксатор стопы (при необходимости) – 2 шт.

2.20 Столик (при необходимости) – 1 шт.

2.21 Защитный колпак на спицы (при необходимости) – 2 шт.

2.22 Поясничный валик (при необходимости) – 1 шт.

2.23 Тростедержатель (при необходимости) – 1 шт.

2.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса (при необходимости) – 2 шт.

2.25 Рюкзак (при необходимости) – 1 шт.

2.26 Подставка - подушка для ног (при необходимости) – 1 шт.

2.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист

7

Копировал

Формат А4

3 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие - изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

3.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

3.4 При покупке товара необходимо контролировать правильное заполнение гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи.

3.5 Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3.6 В случае обнаружения неисправностей в кресле - коляске в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

3.7 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

3.8 Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло - коляску вплоть до замены ее в целом, если за этот срок кресло - коляска выйдет из строя или ухудшатся ее характеристики, установленные настоящими техническими условиями.

3.9 Предприятие - изготовитель не несет ответственности в случае повреждений кресла - коляски, возникших из-за неправильной эксплуатации:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящем руководстве по эксплуатации;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломок деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезда на препятствия высотой более 40 мм;
- перемещений в кресле - коляске на спущенных шинах;
- проколах камер в шинах колес и т.п.

3.10 Гарантийные обязательства не распространяются на части кресла - коляски, подверженные естественному износу, такие как покрышки, камеры покрышек, текстильные элементы.

3.11 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисный центр компании производителя.

3.12 Срок службы кресла - коляски – 6 лет.

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № дубл.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист
8

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, упакована на предприятии - изготовителе
согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист
9

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, соответствует ТУ 30.92.20-018-66445146-2018
и признана годной для эксплуатации.

Параметры и характеристики кресла - коляски с ручным приводом складного
Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 в варианте исполнения _____,
серийный номер _____, приведены в приложении А.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					66445146.942815.20.000.00.00 ПС				
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист 10				

Копировал

Формат А4

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Перед началом эксплуатации извлеките составные части кресла - коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений.

6.2 Кресло - коляска должно быть укомплектовано согласно раздела 2.

6.3 Монтаж и необходимые регулировки осуществляются с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию кресла - коляски.

6.5 При посадке пользователя в кресло - коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должны быть подняты в вертикальное положение.

6.6 Запрещается эксплуатация кресла - коляски с неисправными тормозами.

6.7 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.8 Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло - коляску и оценивать управление креслом - коляской собственными силами. Для парковки должны быть использованы тормоза на колесах кресла - коляски.

6.9 Кресло - коляска складывается и раскладывается без использования инструмента.

6.10 Кресло - коляска поставляется в сложенном виде. Для раскладывания кресла - коляски необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.11 Высота опор для ног должны быть отрегулированы по длине голени.

6.12 Устройство, предохраняющее от опрокидывания, должно быть отрегулировано по высоте.

6.13 Перед использованием кресла - коляски требуется проверка давления в пневматических шинах: для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.

6.14 Для складывания кресла - коляски опоры для ног требуется поднять в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

6.15 Для посадки спереди следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
- сложить вверх подножки;
- при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;
- опустить вниз подножки и поставить на них ноги;
- пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.16 Для посадки с боковой стороны следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
- откинуть подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;
- сложить подножки вверх;

Подп. и дата	
Име. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Име. № подл.	

Име.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.20.000.00.00 ПС

Лист

11

Копировал

Формат А4

– при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;

– установить подлокотники и подножки в исходное положение;

– пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.17 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.18 При самостоятельном передвижении на кресле - коляске необходимо использовать приводные ободы на задних колесах.

6.19 Для парковки необходимо использовать стояночный тормоз.

6.20 Кресло - коляска, освобожденное от транспортной упаковки, должно храниться при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до +40 0С, относительной влажности до 98% (при температуре +25 0С) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.20.000.00.00 ПС	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

7 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя, кресло - коляска подлежит утилизации. Допускается утилизация кресла - коляски вместе с бытовыми отходами. Кресло - коляска относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, СанПиН 2.1.3684-21).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.20.000.00.00 ПС	Лист
						13
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

8 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание кресла - коляски могут выполняться исключительно в сервис - центре компании ООО «Ортонака». Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла - коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре или у Вашего регионального представителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: servise@ortonica.ru.

Име. № подл.	Подп. и дата			
Взам. инв. №	Име. № дубл.			
Подп. и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
66445146.942815.20.000.00.00 ПС				
Лист				
14				

[illegible]

15

**КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ORTONICA ПО
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024**

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:

**КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ С ОТКИДНОЙ
СПИНКОЙ ORTONICA RECLINE 1000**

ПАСПОРТ

66445146.942815.30.000.00.00 ПС

2024

Линия отреза при поставке на экспорт

С _____
Кресло – коляска с ручным
приводом складное Ortonica
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024
вариант исполнения:

Кресло - коляска с ручным приводом
складное с откидной спинкой
Ortonica Recline 1000

№ _____
Номер изделия

код ОКП

Паспорт
66445146.942815.30.000.00.00 ПС

ФНН

2024 г

Перв. присл.

Справ. №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Сведения об изделии

1.1.1 Кресло – коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline 1000 (далее по тексту – кресло - коляска).

1.1.2 Разработчик и производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника» (ООО «Ортоника»),
Юридический адрес: 301600, Российская Федерация, Тульская область, муниципальный район Узловский, городское поселение город Узловая, город Узловая, улица Гагарина, дом 16, офис 116

Тел: +7 (495) 648-60-42, e-mail: info@ortonica.ru,

Адрес места производства:

394026, Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Московский, дом 11/40.

66445146.942815.30.000.00.00 ПС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Майорова		
Пров.		Хохлова		
Н.контр.		Белякова		
Утв.		Титаренко		

Кресло - коляска с ручным
приводом складное с откидной
спинкой Ortonica Recline 1000
Паспорт

Лит.	Лист	Листов
0/0	2	16
ООО «ОРТОНИКА»		

Копировал

Формат А4

1.2 Технические данные

Наименование показателя	Значение
1 Габаритная ширина кресла -коляски, ±10 мм	590, 620, 650, 675, 700, 730
2 Ширина сиденья, ±10 мм*	380, 405, 430, 455, 480, 505
3 Эффективная ширина сиденья, ±10 мм	390, 410, 440, 460, 490, 510
4 Угол наклона плоскости сиденья, ±5°**	минус 10/ +10
5 Габаритная высота кресла -коляски, ±10 мм**	990-1270
6 Полная габаритная длина кресла - коляски, ±10 мм	1190
7 Ширина кресла – коляски в сложенном состоянии, ±10 мм	330
8 Высота кресла – коляски в сложенном состоянии, ±10 мм	720, 720, 720, 750, 770, 795
9 Длина кресла – коляски в сложенном состоянии, ±10 мм	840
10 Эффективная глубина сиденья, ±10 мм**	455-580
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
11 Высота сиденья, ±10 мм**	460-500
Кол-во шагов	3
Кол-во положений	4
12 Высота спинки, ±15 мм**	510-610
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
13 Угол наклона спинки, ±1°**	90-140
Шаг регулировки, угол°	10
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
14 Расстояние между подголовником и спинкой, ±10 мм	150/80
15 Высота подлокотника, ±5 мм**	225-255 (тип 01); 240-310 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	15 (тип 01); 10 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 7 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 8 (тип 02)
16 Расстояние от переднего края подлокотника до спинки, ±10 мм	280/390 (тип 01); 310/420 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	55 (тип 01) 36,5 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 3 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 4 (тип 02)
17 Масса нетто, кг, не более	25,0
18 Масса брутто, кг, не более	30,0
19 Масса самой тяжелой части кресла – коляски (рамы), кг, не более	12

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.30.000.00.00 ПС

Лист

3

Копировал

Формат А4

20 Максимальная масса пользователя, кг	125
21 Механическая нагрузка, Н	1250
22 Высота препятствия с грузом, мм, не более	40
23 Длина подножки, ± 10 мм:	
- тип 01, 02**;	340-480
- тип 03**;	410-440
- тип 04**.	350-500
Тип регулировки:	
- тип 01, 02;	плавная
- тип 03, 04.	ступенчатая
Кол-во шагов:	
- тип 03;	1
- тип 04.	7
Кол-во положений:	
- тип 03;	2
- тип 04.	8
24 Угол наклона подножки к поверхности сиденья, ± 100	
- тип 01, 02, 03;	110
- тип 04**.	114-180
25 Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	530
26 Диаметр ведущего (фиксированного) колеса, ± 10 мм	600
27 Диаметр самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	200
28 Диапазон регулирования переднего колеса по вертикали, ± 10 мм	43
Шаг регулировки, мм	14
Кол-во шагов	4/3 рабочих
Кол-во положений	5/4 рабочих
29 Вертикальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	100
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
30 Горизонтальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	120
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	6
Кол-во положений	7
31 Ширина колеи самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	455, 455, 480, 505, 530, 560
32 Ширина колеи приводных колес, ± 10 мм	540, 540, 565, 585, 615, 620
33 Клиренс загруженного кресла – коляски, мм, не менее	30

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.30.000.00.00 ПС	Лист
						4

Копировал

Формат А4

* Размерный ряд кресла - коляски соответствует ширине сиденья:

размер 1 – 380 мм;
 размер 2 – 405 мм;
 размер 3 – 430 мм;
 размер 4 – 455 мм;
 размер 5 – 480 мм;
 размер 6 – 505 мм;
 размер 7 – 530 мм;
 размер 8 – 560 мм;
 размер 9 – 585 мм;
 размер 10 – 610 мм.

** Регулировка осуществляется в пределах указанного диапазона.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.30.000.00.00 ПС					Лист
										5

Копировал

Формат А4

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline 1000 в составе:

2.1 Кресло - коляска Ortonica Recline 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 шт. в составе:

2.1.1. Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 - 1 шт. (при необходимости).

2.1.2 Сиденье – 1 шт.

2.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости),
- подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

2.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

2.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 05 – 1 шт. (при необходимости);

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
66445146.942815.30.000.00.00 ПС	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата
Лист	
6	

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 06 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 08 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 09 – 1 шт. (при необходимости).

2.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).

2.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).

2.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):

– распорка для жесткости тип 01 – 1 шт.;

– распорка для жесткости тип 02 – 1 шт.

2.6 Подножка в вариантах исполнения:

– подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

2.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):

– подголовник тип 01 – 1 шт.;

– подголовник тип 02 – 1 шт.;

– подголовник тип 03 – 1 шт.;

– подголовник тип 04 – 1 шт.

2.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).

2.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:

– антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).

2.10 Абдуктор -1 шт. (при необходимости).

2.11 Набор инструментов, в составе:

– гаечный ключ – 1 шт.;

– ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.

2.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):

– механический – 1 шт.;

– механический с манометром – 1 шт.

2.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для спинки тип 01 - 1 шт.;

– подушка для спинки тип 02 - 1 шт.

2.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.30.000.00.00 ПС

Лист
7

Копировал

Формат А4

3 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие - изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

3.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

3.4 При покупке товара необходимо контролировать правильное заполнение гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи.

3.5 Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3.6 В случае обнаружения неисправностей в кресле - коляске в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

3.7 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

3.8 Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло - коляску вплоть до замены ее в целом, если за этот срок кресло - коляска выйдет из строя или ухудшатся ее характеристики, установленные настоящими техническими условиями.

3.9 Предприятие - изготовитель не несет ответственности в случае повреждений кресла - коляски, возникших из-за неправильной эксплуатации:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящем руководстве по эксплуатации;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломок деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезда на препятствия высотой более 40 мм;
- перемещений в кресле - коляске на спущенных шинах;
- проколах камер в шинах колес и т.п.

3.10 Гарантийные обязательства не распространяются на части кресла - коляски, подверженные естественному износу, такие как покрышки, камеры покрышек, текстильные элементы.

3.11 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисный центр компании производителя.

3.12 Срок службы кресла - коляски – 6 лет.

Ина. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Иам.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.30.000.00.00 ПС

Лист
9

Копировал

Формат А4

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, упакована на предприятии -
изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской
документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.30.000.00.00 ПС	Лист
						10

Копировал

Формат А4

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Перед началом эксплуатации извлеките составные части кресла - коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений.

6.2 Кресло - коляска должно быть укомплектовано согласно раздела 2.

6.3 Монтаж и необходимые регулировки осуществляются с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию кресла - коляски.

6.5 При посадке пользователя в кресло - коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должны быть подняты в вертикальное положение.

6.6 Запрещается эксплуатация кресла - коляски с неисправными тормозами.

6.7 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.8 Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло - коляску и оценивать управление креслом - коляской собственными силами. Для парковки должны быть использованы тормоза на колесах кресла - коляски.

6.9 Кресло - коляска складывается и раскладывается без использования инструмента.

6.10 Кресло - коляска поставляется в сложенном виде. Для раскладывания кресла - коляски необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.11 Высота опор для ног должны быть отрегулированы по длине голени.

6.12 Устройство, предохраняющее от опрокидывания, должно быть отрегулировано по высоте.

6.13 Перед использованием кресла - коляски требуется проверка давления в пневматических шинах: для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.

6.14 Для складывания кресла - коляски опоры для ног требуется поднять в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

6.15 Для посадки спереди следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
- сложить вверх подножки;
- при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;
- опустить вниз подножки и поставить на них ноги;
- пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.16 Для посадки с боковой стороны следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
- откинуть подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Име. № подл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Име. № подл.	Подп. и дата

Име.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.30.000.00.00 ПС

Лист

12

Копировал

Формат А4

- сложить подножки вверх;
- при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;
- установить подлокотники и подножки в исходное положение;
- пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.17 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.18 При самостоятельном передвижении на кресле - коляске необходимо использовать приводные ободы на задних колесах.

6.19 Для парковки необходимо использовать стояночный тормоз.

6.20 Кресло - коляска, освобожденное от транспортной упаковки, должно храниться при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до +40 °С, относительной влажности до 98% (при температуре +25 °С) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.30.000.00.00 ПС	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

7 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя, кресло - коляска подлежит утилизации. Допускается утилизация кресла - коляски вместе с бытовыми отходами. Кресло - коляска относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, СанПиН 2.1.3684-21).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.30.000.00.00 ПС	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

8 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание кресла - коляски могут выполняться исключительно в сервис - центре компании ООО «Ортоника». Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла - коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре или у Вашего регионального представителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: servise@ortonica.ru.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.30.000.00.00 ПС	Лист
Име.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15

[illegible]

Инв. № подл.

16

КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ORTONICA ПО
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:

КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ОБЛЕГЧЕННОЕ
ORTONICA TREND 1000

ПАСПОРТ

66445146.942815.40.000.00.00 ПС

2024

Линия отреза при поставке на экспорт

С _____
Кресло – коляска с ручным
приводом складное Ortonica
ПС
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024
вариант исполнения:
Кресло – коляска с ручным приводом
складное облегченное Ortonica Trend 1000
№ _____

Номер изделия

код ОКП

Паспорт
66445146.942815.40.000.00.00

ФНН

2024 г

Перв. присвоен.	1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	1.1 Сведения об изделии 1.1.1 Кресло – коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения: Кресло – коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000 (далее по тексту – кресло - коляска). 1.1.2 Разработчик и производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника» (ООО «Ортоника»), Юридический адрес: 301600, Российская Федерация, Тульская область, муниципальный район Узловский, городское поселение город Узловая, город Узловая, улица Гагарина, дом 16, офис 116 Тел: +7 (495) 648-60-42, e-mail: info@ortonica.ru, Адрес места производства: 394026, Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Московский, дом 11/40.				
Справ. №					
Подп. и дата.					
Изм. № дубл.					
Взам. кнв. №					
Подп. и дата					
Изм. № подл.					

66445146.942815.40.000.00.00 ПС									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кресло – коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000 Паспорт	Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Майорова		12.12.24		О	О	2	16
Пров.		Хохлова		12.12.24					
Н.контр.		Белякова		12.12.24		ООО «ОРТОНИКА»			
Утв.		Титаренко		12.12.24					

1.2 Технические данные

Наименование показателя	Значение
1 Габаритная ширина кресла -коляски, ± 10 мм	565, 580, 605, 630, 660, 690
2 Ширина сиденья, ± 10 мм [*]	380, 405, 430, 455, 480, 505
3 Эффективная ширина сиденья, ± 10 мм	400, 405, 430, 465, 500, 525
4 Угол наклона плоскости сиденья, $\pm 5^{\circ}$ ^{**}	минус 10/ +20
5 Габаритная высота кресла -коляски, ± 10 мм ^{**}	885-1105
6 Полная габаритная длина кресла - коляски, ± 10 мм	1190
7 Ширина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	280
8 Высота кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	735, 735, 735, 750, 760, 770
9 Длина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	790
10 Эффективная глубина сиденья, ± 10 мм ^{**}	420-480
Шаг регулировки, мм	15
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
11 Высота сиденья, ± 10 мм ^{**}	470-545
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
12 Высота спинки, ± 15 мм ^{**}	450-550
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
13 Угол наклона спинки, $\pm 1^{\circ}$ ^{**}	90
Шаг регулировки, угол ⁰	-
Кол-во шагов	-
Кол-во положений	-
14 Расстояние между подголовником и спинкой, ± 10 мм	150/80
15 Высота подлокотника, ± 5 мм ^{**}	240-270 (тип 03); 250-320 (тип 04)
Шаг регулировки, мм	15 (тип 03); 10 (тип 04)
Кол-во шагов	2 (тип 03); 7 (тип 04)
Кол-во положений	3 (тип 03); 8 (тип 04)
16 Расстояние от переднего края подлокотника до спинки, ± 10 мм	280/390 (тип 03); 310/420 (тип 04)
Шаг регулировки, мм	55 (тип 03) 36,5 (тип 04)
Кол-во шагов	2 (тип 03) 3 (тип 04)
Кол-во положений	3 (тип 03); 4 (тип 04)
17 Масса нетто, кг, не более	25,0
18 Масса брутто, кг, не более	30,0
19 Масса самой тяжелой части кресла – коляски (рамы), кг, не более	12

Подп. и дата

Имя, № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имя, № подл.

66445146.942815.40.000.00.00 ПС

Лист

3

Имя, Лист, № докум., Подп., Дата

Копировал

Формат А4

20 Максимальная масса пользователя, кг	125
21 Механическая нагрузка, Н	1250
22 Высота препятствия с грузом, мм, не более	40
23 Длина подножки, ± 10 мм:	
- тип 01, 02**;	340-480
- тип 03**;	410-440
- тип 04**.	350-500
Тип регулировки:	
- тип 01, 02;	плавная
- тип 03, 04.	ступенчатая
Кол-во шагов:	
- тип 03;	1
- тип 04.	7
Кол-во положений:	
- тип 03;	2
- тип 04.	8
24 Угол наклона подножки к поверхности сиденья, $\pm 10^0$	
- тип 01, 02, 03;	110
- тип 04**.	114-180
25 Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	525
26 Диаметр ведущего (фиксированного) колеса, ± 10 мм	600
27 Диаметр самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	180
28 Диапазон регулирования переднего колеса по вертикали, ± 10 мм	80
Шаг регулировки, мм	16
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
29 Вертикальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	120
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	6
Кол-во положений	7
30 Горизонтальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	105
Шаг регулировки, мм	15
Кол-во шагов	7
Кол-во положений	8
31 Ширина колеи самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	430, 445, 465, 485, 520, 550
32 Ширина колеи приводных колес, ± 10 мм	475, 495, 520, 545, 570, 600
33 Клиренс загруженного кресла – коляски, мм, не менее	30

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.40.000.00.00 ПС

Лист

4

Копировал

Формат А4

**** Регулировка осуществляется в пределах указанного диапазона.**

5

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения: Кресло -коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000 в составе:

2.1 Кресло - коляска Ortonica Trend 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 в составе:

2.1.1. Рама в вариантах исполнения:

– рама тип 02 – 1 шт. (при необходимости);

– рама тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

2.1.2 Сиденье – 1 шт.

2.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

– подлокотник тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– подлокотник тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

– ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

– ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);

– ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);

– ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

2.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

– колесо переднее литое тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо переднее пневматическое тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

– колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 05 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 05 – 2 шт. (при необходимости).

2.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

2.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 – 1 шт. (при необходимости).

2.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.40.000.00.00 ПС	Лист
											6

3 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие - изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

3.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

3.4 При покупке товара необходимо контролировать правильное заполнение гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи.

3.5 Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3.6 В случае обнаружения неисправностей в кресле - коляске в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

3.7 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

3.8 Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло - коляску вплоть до замены ее в целом, если за этот срок кресло - коляска выйдет из строя или ухудшатся ее характеристики, установленные настоящими техническими условиями.

3.9 Предприятие - изготовитель не несет ответственности в случае повреждений кресла - коляски, возникших из-за неправильной эксплуатации:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящем руководстве по эксплуатации;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезда на препятствия высотой более 40 мм;
- перемещений в кресле - коляске на спущенных шинах;
- проколах камер в шинах колес и т.п.

3.10 Гарантийные обязательства не распространяются на части кресла - коляски, подверженные естественному износу, такие как покрышки, камеры покрышек, текстильные элементы.

3.11 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисный центр компании производителя.

3.12 Срок службы кресла - коляски – 6 лет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.40.000.00.00 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, упакована на предприятии -
изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской
документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.40.000.00.00 ПС					Лист
										10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____, серийный номер _____, соответствует ТУ 30.92.20-018-66445146-2018 и признана годной для эксплуатации.

Параметры и характеристики кресла - коляски с ручным приводом складного Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 в варианте исполнения _____, серийный номер _____, приведены в приложении А.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.40.000.00.00 ПС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Перед началом эксплуатации извлеките составные части кресла - коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений.

6.2 Кресло - коляска должно быть укомплектовано согласно раздела 2.

6.3 Монтаж и необходимые регулировки осуществляются с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию кресла – коляски.

6.5 При посадке пользователя в кресло - коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставлять на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должны быть подняты в вертикальное положение.

6.6 Запрещается эксплуатация кресла - коляски с неисправными тормозами.

6.7 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.8 Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло - коляску и оценивать управление креслом - коляской собственными силами. Для парковки должны быть использованы тормоза на колесах кресла – коляски.

6.9 Кресло - коляска складывается и раскладывается без использования инструмента.

6.10 Кресло - коляска поставляться в сложенном виде. Для раскладывания кресла - коляски необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.11 Высота опор для ног должны быть отрегулированы по длине голени.

6.12 Устройство, предохраняющее от опрокидывания, должно быть отрегулировано по высоте.

6.13 Перед использованием кресла - коляски требуется проверка давления в пневматических шинах: для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.

6.14 Для складывания кресла - коляски опоры для ног требуется поднять в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

6.15 Для посадки спереди следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
- сложить вверх подножки;
- при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;
- опустить вниз подножки и поставить на них ноги;
- пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.16 Для посадки с боковой стороны следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	66445146.942815.40.000.00.00 ПС					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	12

7 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя, кресло - коляска подлежит утилизации. Допускается утилизация кресла - коляски вместе с бытовыми отходами. Кресло - коляска относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, СанПиН 2.1.3684-21).

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
66445146.942815.40.000.00.00 ПС				
Лист				
14				

8 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание кресла - коляски могут выполняться исключительно в сервис - центре компании ООО «Ортонака». Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла - коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре или у Вашего регионального представителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: servise@ortonica.ru.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.40.000.00.00 ПС	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

16

КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ ORTONICA ПО
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:

КРЕСЛО - КОЛЯСКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СКЛАДНОЕ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (ПОДДЕРЖКОЙ) ГОЛОВЫ И ТЕЛА, ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЦП,
ORTONICA COMFORT 1000

ПАСПОРТ

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

2024

Линия отреза при поставке на экспорт

С _____
Кресло – коляска с ручным
приводом складное Ortonica
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024

код ОКП

Паспорт

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

вариант исполнения:

Кресло - коляска с ручным приводом
складное с дополнительной фиксацией
(поддержкой) головы и тела,
для инвалидов и детей-инвалидов,
в том числе для больных ДЦП,
Ortonica Comfort 1000

ФНН

2024 г

№

Номер изделия

Перв. примен.	1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ													
	1.1 Сведения об изделии 1.1.1 Кресло – коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000 (далее по тексту – кресло - коляска). 1.1.2 Разработчик и производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника» (ООО «Ортоника»), Юридический адрес: 301600, Российская Федерация, Тульская область, муниципальный район Узловский, городское поселение город Узловая, город Узловая, улица Гагарина, дом 16, офис 116 Тел: +7 (495) 648-60-42, e-mail: info@ortonica.ru, Адрес места производства: 394026, Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Московский, дом 11/40.													
Справ. №														
Подп. и дата.														
Инв. № дубл.														
Взам. инв. №														
Подп. и дата														
Инв. № подл.														
	66445146.942815.50.000.00.00 ПС													
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
	Разраб.	Майорова												
Пров.	Хохлова													
Н.контр.	Белякова													
Утв.	Титаренко													
Кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000 Паспорт					<table border="1"> <tr> <td>Лит.</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>О О₁</td> <td>2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ООО «ОРТОНИКА»</td> </tr> </table>	Лит.	Лист	Листов	О О ₁	2	16	ООО «ОРТОНИКА»		
Лит.	Лист	Листов												
О О ₁	2	16												
ООО «ОРТОНИКА»														

Копировал

Формат А4

1.2 Технические данные

Наименование показателя	Значение
1 Габаритная ширина кресла -коляски, ± 10 мм	590, 620, 645, 675, 700, 730
2 Ширина сиденья, ± 10 мм [*]	380, 405, 430, 455, 480, 505
3 Эффективная ширина сиденья, ± 10 мм	390, 410, 440, 460, 490, 510
4 Угол наклона плоскости сиденья, $\pm 5^{\circ}$ ^{**}	минус 10/ +10
5 Габаритная высота кресла -коляски, ± 10 мм ^{**}	990-1270
6 Полная габаритная длина кресла - коляски, ± 10 мм	1190
7 Ширина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	330
8 Высота кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	720, 720, 720, 750, 770, 795
9 Длина кресла – коляски в сложенном состоянии, ± 10 мм	840
10 Эффективная глубина сиденья, ± 10 мм ^{**}	455-580
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
11 Высота сиденья, ± 10 мм ^{**}	460-500
Кол-во шагов	3
Кол-во положений	4
12 Высота спинки, ± 15 мм ^{**}	510-610
Шаг регулировки, мм	25
Кол-во шагов	4
Кол-во положений	5
13 Угол наклона спинки, $\pm 1^{\circ}$ ^{**}	90-140
Шаг регулировки, угол ⁰	10
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
14 Расстояние между подголовником и спинкой, ± 10 мм	150/80
15 Высота подлокотника, ± 5 мм ^{**}	225-255 (тип 01); 240-310 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	15 (тип 01); 10 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 7 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 8 (тип 02)
16 Расстояние от переднего края подлокотника до спинки, ± 10 мм	280/390 (тип 01); 310/420 (тип 02)
Шаг регулировки, мм	55 (тип 01) 36,5 (тип 02)
Кол-во шагов	2 (тип 01); 3 (тип 02)
Кол-во положений	3 (тип 01); 4 (тип 02)
17 Масса нетто, кг, не более	25,0
18 Масса брутто, кг, не более	30,0
19 Масса самой тяжелой части кресла – коляски (рамы), кг, не более	12

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

Лист

3

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

Копировал

Формат А4

20 Максимальная масса пользователя, кг	125
21 Механическая нагрузка, Н	1250
22 Высота препятствия с грузом, мм, не более	40
23 Длина подножки, ± 10 мм:	
- тип 01, 02**;	340-480
- тип 03**;	410-440
- тип 04**.	350-500
Тип регулировки:	
- тип 01, 02;	плавная
- тип 03, 04.	ступенчатая
Кол-во шагов:	
- тип 03;	1
- тип 04.	7
Кол-во положений:	
- тип 03;	2
- тип 04.	8
24 Угол наклона подножки к поверхности сиденья, ± 100	
- тип 01, 02, 03;	110
- тип 04**.	114-180
25 Диаметр обода ручного привода, ± 10 мм	530
26 Диаметр ведущего (фиксированного) колеса, ± 10 мм	600
27 Диаметр самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	200
28 Диапазон регулирования переднего колеса по вертикали, ± 10 мм	43
Шаг регулировки, мм	14
Кол-во шагов	4/3 рабочих
Кол-во положений	5/4 рабочих
29 Вертикальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	100
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	5
Кол-во положений	6
30 Горизонтальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	120
Шаг регулировки, мм	20
Кол-во шагов	6
Кол-во положений	7
31 Ширина колеи самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	455, 455, 480, 505, 530, 560
32 Ширина колеи приводных колес, ± 10 мм	540, 540, 565, 585, 615, 620
33 Клиренс загруженного кресла – коляски, мм, не менее	30

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

Лист

4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

**** Регулировка осуществляется в пределах указанного диапазона.**

3

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения: Кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000 в составе:

2.1 Кресло - коляска Ortonica Comfort 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 шт. в составе:

2.1.1. Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 - 1 шт. (при необходимости).

2.1.2 Сиденье - 1 шт.

2.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 01 - 2 шт. (при необходимости),
- подлокотник тип 02 - 2 шт. (при необходимости).

2.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 - 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 - 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 - 1 шт. (при необходимости).

2.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 01 - 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 - 2 шт. (при необходимости).

2.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 - 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 - 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 04 - 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 04 - 2 шт. (при необходимости).

2.1.7 Тормоз стояночный - 2 шт.

2.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 02 - 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 03 - 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 05 - 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 06 - 1 шт. (при необходимости);

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 - 1 шт. (при необходимости);

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

6

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 09 – 1 шт. (при необходимости).

2.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).

– распорка для жесткости тип 01 – 1 шт.;

2.6 Подножка в вариантах исполнения:

– подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

– подголовник тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

– подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);

— подголовник тип 04 — 1 шт. (при необходимости).

2.8 Боковая поддержка – 2 шт.

2.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:

– антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).

2.10 Абдуктор -1 шт.

2.11 Набор инструментов, в составе:

– гаечный ключ – 1 шт.;

– ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.

2.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):

– механический – 1 шт.;

– механический с манометром – 1 шт.

2.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для спинки тип 01 - 1 шт.;

– подушка для спинки тип 02 - 1 шт.

2.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;

– подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.

~~2.15 Жесткое основание для сиденья (при необходимости) 1 шт.~~

2.16 Жесткое основание для осадки (при необходимости) – 1 шт.

00445146.942815.50.000.00:00 ПС

Лист

7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Копировал

Формат А4

- 2.17 Ремень для фиксации голени (при необходимости) – 1 шт.
- 2.18 Ремень для фиксации стоп (при необходимости) – 1 шт.
- 2.19 Фиксатор стопы (при необходимости) – 2 шт.
- 2.20 Столик (при необходимости) – 1 шт.
- 2.21 Защитный колпак на спицы (при необходимости) – 2 шт.
- 2.22 Поясничный валик (при необходимости) – 1 шт.
- 2.23 Тростедержатель (при необходимости) – 1 шт.
- 2.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса (при необходимости) – 2 шт.
- 2.25 Рюкзак (при необходимости) – 1 шт.
- 2.26 Подставка - подушка для ног (при необходимости) – 1 шт.
- 2.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 2.28 Паспорт – 1 шт.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № субл.	Подп. и дата					
					66445146.942815.50.000.00.00 ПС				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 8				

Копировал

Формат А4

3 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие - изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

3.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

3.4 При покупке товара необходимо контролировать правильное заполнение гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи.

3.5 Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3.6 В случае обнаружения неисправностей в кресле - коляске в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

3.7 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

3.8 Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло - коляску вплоть до замены ее в целом, если за этот срок кресло - коляска выйдет из строя или ухудшатся ее характеристики, установленные настоящими техническими условиями.

3.9 Предприятие - изготовитель не несет ответственности в случае повреждений кресла - коляски, возникших из-за неправильной эксплуатации:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящем руководстве по эксплуатации;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезда на препятствия высотой более 40 мм;
- перемещений в кресле - коляске на спущенных шинах;
- проколах камер в шинах колес и т.п.

3.10 Гарантийные обязательства не распространяются на части кресла - коляски, подверженные естественному износу, такие как покрышки, камеры покрышек, текстильные элементы.

3.11 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисный центр компании производителя.

3.12 Срок службы кресла - коляски – 6 лет.

Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

Лист

9

Копировал

Формат А4

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, упакована на предприятии - изготовителе
согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

Лист

10

Копировал

Формат А4

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____,
серийный номер _____, соответствует ТУ 30.92.20-018-66445146-
2018 и признана годной для эксплуатации.

Параметры и характеристики кресла - коляски с ручным приводом складного
Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 в варианте исполнения _____,
серийный номер _____, приведены в приложении А.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. име. №	Име. № подл.	Подп. и дата	
					66445146.942815.50.000.00.00 ПС
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					11

Копировал

Формат А4

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Перед началом эксплуатации извлеките составные части кресла - коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений.

6.2 Кресло - коляска должно быть укомплектовано согласно раздела 2.

6.3 Монтаж и необходимые регулировки осуществляются с помощью набора инструментов, который входит в комплектацию кресла – коляски.

6.5 При посадке пользователя в кресло - коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должны быть подняты в вертикальное положение.

6.6 Запрещается эксплуатация кресла - коляски с неисправными тормозами.

6.7 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.8 Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло - коляску и оценивать управление креслом - коляской собственными силами. Для парковки должны быть использованы тормоза на колесах кресла – коляски.

6.9 Кресло - коляска складывается и раскладывается без использования инструмента.

6.10 Кресло - коляска поставляется в сложенном виде. Для раскладывания кресла - коляски необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.

6.11 Высота опор для ног должны быть отрегулированы по длине голени.

6.12 Устройство, предохраняющее от опрокидывания, должно быть отрегулировано по высоте.

6.13 Перед использованием кресла - коляски требуется проверка давления в пневматических шинах: для нормальной эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа.

6.14 Для складывания кресла - коляски опоры для ног требуется поднять в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

6.15 Для посадки спереди следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;

- сложить вверх подножки;

- при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;

- опустить вниз подножки и поставить на них ноги;

- пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.16 Для посадки с боковой стороны следует выполнить действия:

- поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;

- откинуть подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;

- сложить подножки вверх;

Подп. и дата	
Инв. № док.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

Лист

12

– при помощи сопровождающего лица переместить пользователя в кресло - коляску;

– установить подлокотники и подножки в исходное положение;

– пристегнуть ремень безопасности.

Высадку требуется осуществлять в обратной последовательности.

6.17 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

6.18 При самостоятельном передвижении на кресле - коляске необходимо использовать приводные ободы на задних колесах.

6.19 Для парковки необходимо использовать стояночный тормоз.

6.20 Кресло - коляска, освобожденное от транспортной упаковки, должно храниться при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до +40 °С, относительной влажности до 98% (при температуре +25 °С) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	66445146.942815.50.000.00.00 ПС	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата		

7 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя, кресло - коляска подлежит утилизации. Допускается утилизация кресла - коляски вместе с бытовыми отходами. Кресло - коляска относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, СанПиН 2.1.3684-21).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
66445146.942815.50.000.00.00 ПС									
					Лист 14				

8 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание кресла - коляски могут выполняться исключительно в сервис - центре компании ООО «Ортоника». Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла - коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре или у Вашего регионального представителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: servise@ortonica.ru.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	66445146.942815.50.000.00.00 ПС	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А4

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.50.000.00.00 ПС

Лист

16

Копировал

Формат А4

Прошнуровано и пронумеровано

80 лист *ав*

Генеральный Директор

ООО «Ортона»

Ю.А. Титаренко



Перв. примен.		Содержание		
		ВВЕДЕНИЕ		3
		1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ		4
		2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ		5
		3 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ		6
		4 ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ		7
		5 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ		8
		6 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		9
		6.1 Кресло-коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000		9
		6.2 Кресло-коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000		12
		6.3 Кресло-коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline 1000		15
		6.4 Кресло-коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000		18
		6.5 Кресло-коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000		21
		7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		24
		8 КОМПЛЕКТНОСТЬ		30
		9 НАЛИЧИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		39
		10 ПОДГОТОВКА КРЕСЛА - КОЛЯСКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ		45
		11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЕСЛА - КОЛЯСКИ		58
		12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ		63
		13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД		65
		14 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		67
		15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ		68
		16 МАРКИРОВКА		70
		17 УПАКОВКА		72
		18 УТИЛИЗАЦИЯ		73
		19 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ		74
		20 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ		75
		21 РЕКЛАМАЦИИ		77
		22 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ		78
		23 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ		79
		24 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		80
		Приложение А Акты технического состояния и выполнения гарантийных обязательств		81
		Лист регистрации изменений		83
		66445146.942815.40.000.00.00 РЭ		
		Изм.	Лист	№ докум.
		Разраб.	Майорова	21.02.24
		Пров.	Кирилловский	21.02.24
		Н.контр.	Хохлова	26.02.24
		Утв.	Титаренко	27.02.24
		Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica		
		Руководство по эксплуатации		
		Лит.	Лист	Листов
		О ОI	2	83
		ООО «ОРТОНИКА»		

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя сведения, необходимые для изучения конструкции и правил эксплуатации, транспортирования и хранения медицинского изделия кресло - коляски с ручным приводом складного Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024.

Прежде чем приступить к использованию кресла - коляски, необходимо изучить и понять содержание настоящего руководства по эксплуатации.

Ниже приведены символы, используемые в настоящем руководстве:

	ОПАСНО!
	Указывает на то, что предполагается высокая вероятность возникновения ситуации, вызывающей риск гибели или нанесения серьезной травмы при несоблюдении данных требований
	ОСТОРОЖНО!
	Указывает на то, что предполагается возможность возникновения ситуации, которая может привести к гибели или нанесению серьезной травмы при несоблюдении данных требований
	ВНИМАНИЕ!
	Указывает на то, что предполагается возможность нанесения травмы или повреждения оборудования при несоблюдении данных требований
	ИНФОРМАЦИЯ
	Обозначает важную информацию

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
3

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование – «Кресло – коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 (далее по тексту – кресло - коляска).

Кресло - коляска представлена следующими вариантами исполнения:

– кресло - коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000 (далее по тексту - Base Lite 1000);

– кресло - коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000 (далее по тексту - Control One 1000);

– кресло - коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline 1000 (далее по тексту - Recline 1000);

– кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000 (далее по тексту - Comfort 1000);

– кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000 (далее по тексту - Trend 1000).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв	убл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
4

394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, д.11.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кресло - коляска предназначено для передвижения людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе для инвалидов, детей - инвалидов, больных ДЦП, как самостоятельно, так и приводимое в движение и управляемое сопровождающим его лицом, в условиях помещений и на дорогах с любым покрытием.

Кресло - коляска предназначено для индивидуального применения и для оснащения отделений лечебно-профилактических учреждений.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв	Подп. и дата	Губл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.40.000.00.00РЭ	Лист
						6

4 ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Потенциальными потребителями кресла - коляски являются люди с ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалиды, дети – инвалиды, больные ДЦП с заболеваниями опорно - двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.

4.1 Показания к применению:

- стойкие деформации или заболевания нижних конечностей, таза или позвоночника в сочетании со стойкими заболеваниями или деформациями верхних конечностей;
- паралич, значительно выраженный, выраженный парез обеих нижних конечностей в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей (не на обеих руках);
- паралич, значительно выраженный парез одной нижней конечности в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей (не на обеих руках); гемиплегия, значительно выраженный гемипарез.

4.2 Противопоказания к применению кресел - колясок:

Запрещается использовать кресло - коляску в тех случаях, когда присутствует один из следующих диагнозов:

- стекловидные кости;
- тяжелая контрактура суставов таза, коленного или голеностопа;
- болезни сердца и кровеносной системы;
- невозможность сохранения сидячего положения;
- потеря функциональности обеих рук (возможно управление только сопровождающим лицом);
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации (возможно управление только сопровождающим лицом);
- наркотическое или алкогольное воздействие;
- психические расстройства;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- повышенное беспокойство, которое может спровоцировать спазмы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам, инв. №	Инв	Лист	Подп. и дата

					66445146.942815.40.000.00.00РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

5 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Код классификационной группировки кресла - коляски по ГОСТ Р ИСО 9999 и ГОСТ Р 58266: 12 22 03, 12 22 09.

5.2 По виду и продолжительности контакта с организмом человека кресло - коляска относится к категории А по ГОСТ ISO 10993-1.

5.3 В зависимости от потенциального риска применения кресло - коляска относится к I классу по ГОСТ 31508.

5.4 В зависимости от воспринимаемых механических воздействий кресло – коляска относится к группе 5 по ГОСТ Р 50444.

5.5 Кресло - коляска выпускается в климатическом исполнении «У1.1» по ГОСТ 15150.

5.6 В зависимости от массы тела пользователя кресло - коляска относится к следующим группам по ГОСТ Р ИСО 7176-5:

– ко II группе (пользователи с массой тела от 50 до 125 кг) относится кресло - коляска в вариантах исполнения: Base Lite 1000, размер 1,2,3,4,5,6; Control One 1000, размер 1,2,3,4,5,6; Recline 1000, размер 1,2,3,4,5,6; Comfort 1000, размер 1,2,3,4,5,6; Trend 1000, размер 1,2,3,4,5,6;

– к III группе (пользователи с массой тела свыше 125 кг) относится кресло - коляска Base Lite 1000, размер 7, 8, 9, 10.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв	рубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
66445146.942815.40.000.00.00РЭ					Лист
					8

6 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кресло – коляска изготавливается в различных вариантах исполнения, различающихся шириной сиденья, массой, габаритными размерами, конструктивно – технологическими решениями, функциональным назначением составных частей и возможностью их регулировки, дизайном, что позволяет пользователям подобрать кресло - коляску с учетом анатомических особенностей и антропометрических данных.

Принцип действия кресла - коляски состоит в приложении мускульной силы рук пациента к ободу ручного привода на задние колеса или мускульной силы сопровождающего лица к рукоятке кресла - коляски, приводящей в движение кресло - коляску с расположенным в ней пациентом.

6.1 Кресло - коляска Ortonica Base Lite 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 предназначено для пользования в положении сидя, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки. Варианты исполнения отличаются комплектацией, конструктивными особенностями, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Размеры кресла - коляски соответствуют следующим ширинам сидений: размер 1 – 380 мм; размер 2 – 405 мм; размер 3 – 430 мм; размер 4 – 455 мм; размер 5 – 480 мм; размер 6 – 505 мм; размер 7 – 530 мм; размер 8 – 560 мм; размер 9 – 585 мм; размер 10 – 610 мм.

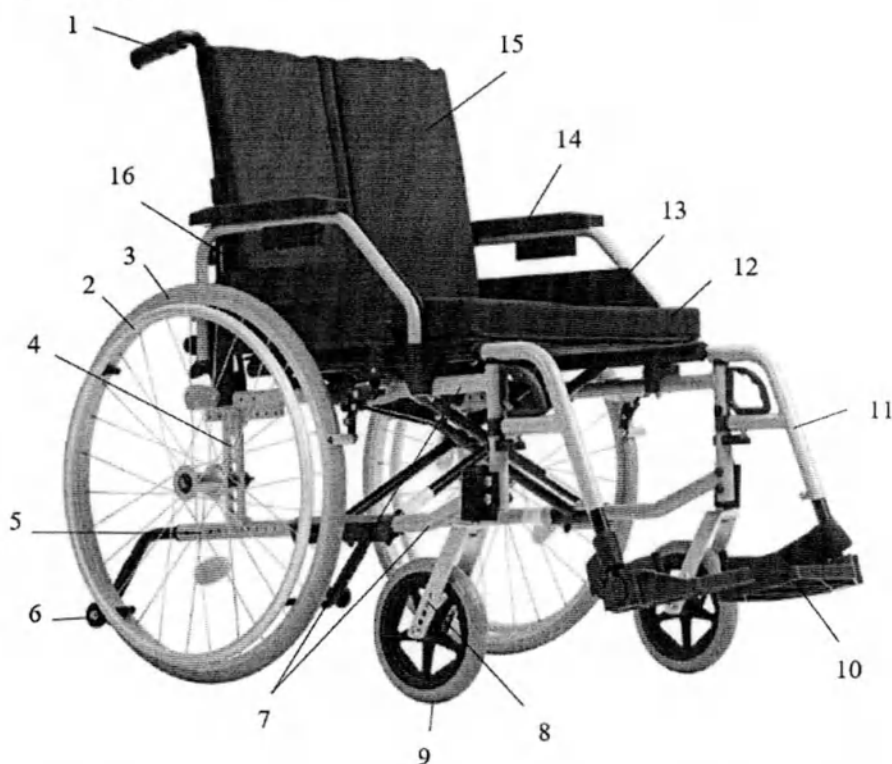

- | | |
|--|--|
| 1. Анатомические ручки для сопровождающего лица спинки со светоотражающей нашивкой типа 01 | 9. Колесо переднее литое тип 01 |
| 2. Приводной обод заднего колеса | 10. Опоры для стоп подножки типа 01 |
| 3. Колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 | 11. Подножка тип 01 |
| 4. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по вертикали | 12. Подушка для сиденья тип 01 |
| 5. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по горизонтали | 13. Боковой щиток подлокотника типа 01 |
| 6. Антипрокидыватель тип 05 | 14. Подлокотник тип 01 |
| 7. Рама тип 03 | 15. Спинка со светоотражающей нашивкой, с анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 |
| 8. Отверстия для регулировки колеса переднего литого типа 01 | 16. Рычаг тормоза стояночного |

Рис. 1 Кресло - коляска Ortonica Base Lite 1000

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

9

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

6.1.1 Конструкция и функциональные характеристики кресла - коляски Ortonica Base Lite 1000 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Конструкция кресла – коляски Ortonica Base Lite 1000

Наименование	Вариант исполнения
Рама*	складная (тип 01)
	складная усиленная (тип 03)
Сиденье	регулируемое по высоте, глубине и углу наклона
Подлокотник*	съемный, откидной, регулируемый по высоте с использованием инструмента (тип 01)
	съемный, откидной, регулируемый по высоте кнопочным фиксатором (тип 02)
Ремень безопасности*	двухточечный с пластиковой пряжкой (тип 01)
	двухточечный с металлической пряжкой (тип 02)
	четырёхточечный (тип 03)
	пятиточечный (тип 04)
Колесо переднее*	литое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
	пневматическое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
Колесо заднее приводное со светоотражателями*	литое, быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 01)
	пневматическое, быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 01)
	литое быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 04)
	пневматическое быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 04)
Тормоз стояночный	регулируемый по горизонтали
Спинка со светоотражающей нашивкой*	одинарная, регулируемая по высоте (тип 01)
	одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте (тип 04)
	двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте (тип 07)
Ручки для сопровождающего лица*	цилиндрические
	анатомические
Тормоз для сопровождающего лица	на ручках для сопровождающего лица**
Транзитное колесо	съемное**
Распорка для жесткости*	на спинке (тип 01) **
	на ручках для сопровождающего лица (тип 02) **
Подножка*	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съемная, откидная (тип 01)
	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съемная, откидная (тип 02)
	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине кнопочным фиксатором, съемная, откидная (тип 03)
	в сборе с опорой и ремнем под пятку, с опорой для голени, регулируемая по углу наклона, съемная, откидная (тип 04)
Подголовник*	съемный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 01) **
	съемный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 02) **
	съемный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 03) **
	съемный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 04) **
Боковая поддержка	съемная, мягкая, регулируемая по высоте, ширине и углу наклона, с функцией отведения**

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

10

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 1

Антипрокидыватель*	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 01)
	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 02)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 03)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по длине (тип 04)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по высоте и длине (тип 05)
Абдуктор	латеральный – медиальный**
Набор инструментов, в составе: - гаечный ключ – 1 шт.; - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.	
Насос	механический (для пневматических колес) **
	механический с манометром (для пневматических колес) **
Подушка для спинки *	- пенополиуретановая (тип 01) **
	- пенополиуретановая с жестким основанием (тип 02) **
Подушка для сиденья*	- пенополиуретановая (тип 01) **
	- пенополиуретановая с гелевой вставкой (тип 02) **
	- пенополиуретановая с жестким основанием (тип 03) **
	- пенополиуретановая с гелевой вставкой, с жестким основанием (тип 04) **
	- надувная (тип 05) **.
Жесткое основание для сиденья**	
Жесткое основание для спинки**	
Ремень для фиксации голени**	
Ремень для фиксации стоп **	
Фиксатор стопы **	
Столик **	
Защитный колпак на спицы **	
Поясничный валик **	
Тростедержатель **	
Силиконовый чехол на обод заднего колеса **	
Рюкзак **	
Подставка - подушка для ног **	
Руководство по эксплуатации	
Паспорт	

Примечание – * вариант исполнения на заказ

** при необходимости


66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

11

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

6.2 Кресло - коляска Ortonica Control One 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 предназначено для пользования в положении сидя, имеет дополнительный механизм управления одной рукой (требуется дополнительная установка приводной оси механизма управления одной рукой), управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки. Варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Размеры кресла - коляски соответствуют следующим ширинам сидений: размер 1 – 380 мм; размер 2 – 405 мм; размер 3 – 430 мм; размер 4 – 455 мм; размер 5 – 480 мм; размер 6 – 505 мм.

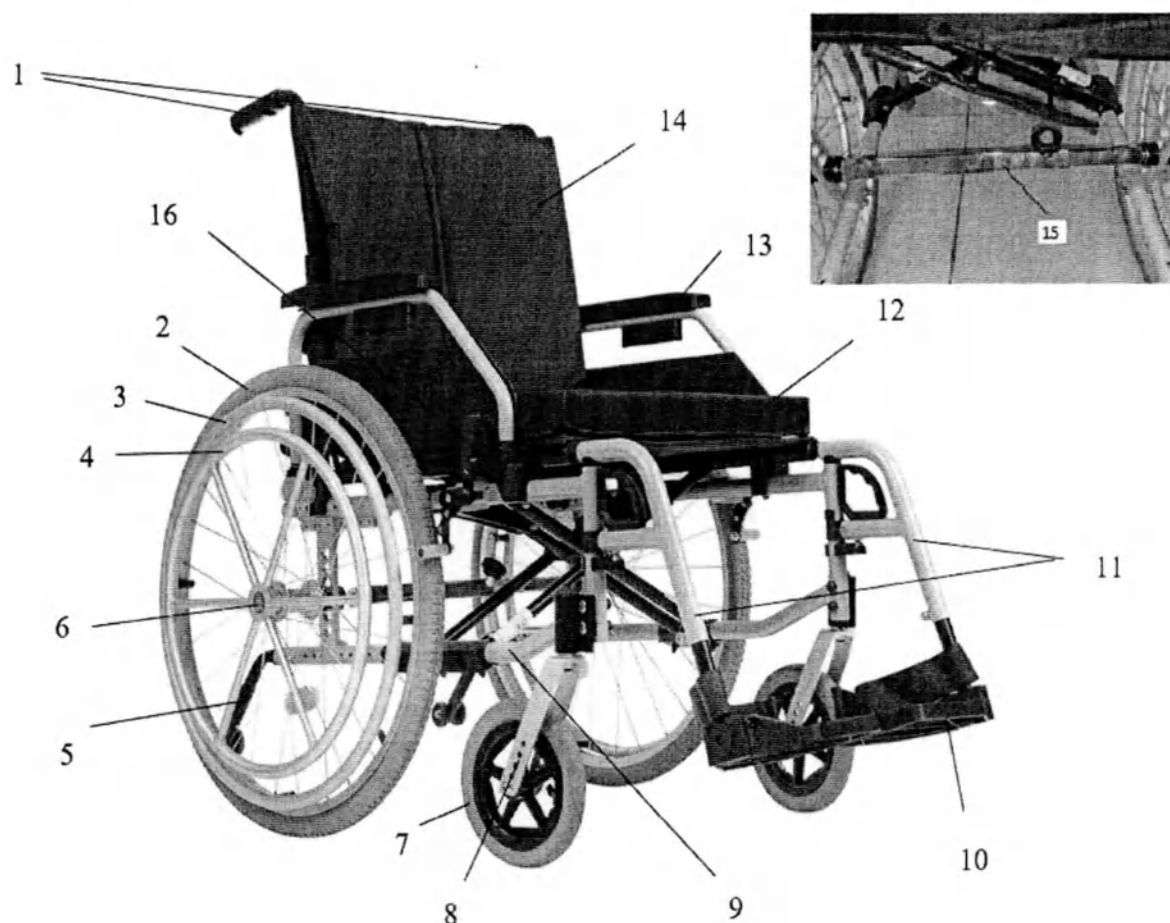

- | | |
|--|--|
| 1. Анатомические ручки для сопровождающего лица спинки со светоотражающей нашивкой типа 04 | 9. Рама тип 01 |
| 2. Колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 03 | 10. Опоры для стоп подножки типа 01 |
| 3. Приводной обод заднего колеса | 11. Подножка тип 01 |
| 4. Приводной обод заднего колеса механизма управления одной рукой | 12. Подушка для сиденья тип 02 |
| 5. Антипрокидыватель тип 04 | 13. Подлокотник тип 01 |
| 6. Быстросъемная ось колеса заднего приводного | 14. Спинка со светоотражающей нашивкой, с анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 |
| 7. Колесо переднее литое тип 01 | 15. Приводная ось механизма управления одной рукой |
| 8. Отверстия для регулировки колеса переднего литого типа 01 | 16. Рычаг тормоза стояночного |

Рис. 2 Кресло - коляска Ortonica Control One 100

6.2.1 Конструкция и функциональные характеристики кресла - коляски Ortonica Control One 1000 представлены в таблице 2.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

12

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Таблица 2 – Конструкция кресла - коляски Ortonica Control One 1000

Наименование	Вариант исполнения
Рама*	складная (тип 01)
	складная усиленная (тип 03)
Сиденье	регулируемое по высоте, глубине и углу наклона
Подлокотник*	съёмный, откидной, регулируемый по высоте с использованием инструмента (тип 01)
	съёмный, откидной, регулируемый по высоте кнопочным фиксатором (тип 02)
Ремень безопасности*	двухточечный с пластиковой пряжкой (тип 01)
	двухточечный с металлической пряжкой (тип 02)
	четырёхточечный (тип 03)
	пятиточечный (тип 04)
Колесо переднее*	литое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
	пневматическое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
Колесо заднее приводное со светоотражателями*	литое, быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с механизмом управления одной рукой (тип 03)
	пневматическое, быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с механизмом управления одной рукой (тип 03)
Тормоз стояночный	регулируемый по горизонтали
Спинка со светоотражающей нашивкой*	одинарная, регулируемая по высоте (тип 01)
	одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте (тип 04)
	двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте (тип 07)
Ручки для сопровождающего лица*	цилиндрические
	анатомические
Тормоз для сопровождающего лица	на ручках для сопровождающего лица**
Транзитное колесо	съёмное**
Распорка для жесткости*	на спинке (тип 01) **
	на ручках для сопровождающего лица (тип 02) **
Подножка*	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съёмная, откидная (тип 01)
	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съёмная, откидная (тип 02)
	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине кнопочным фиксатором, съёмная, откидная (тип 03)
	в сборе с опорой и ремнем под пятку, с опорой для голени, регулируемая по углу наклона, съёмная, откидная (тип 04)
Подголовник*	съёмный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 01) **
	съёмный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 02) **
	съёмный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 03) **
	съёмный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 04) **
Боковая поддержка	съёмная, мягкая, регулируемая по высоте, ширине и углу наклона, с функцией отведения**
Антипрокидыватель *	съёмный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 01)
	съёмный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 02)
	съёмный, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 03)

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

13

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 2

	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по длине (тип 04)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по высоте и длине (тип 05)
Абдуктор	латеральный – медиальный**
Набор инструментов, в составе: - гаечный ключ – 1 шт.; - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.	
Насос	механический (для пневматических колес) ** механический с манометром (для пневматических колес) **
Подушка для спинки*	- пенополиуретановая (тип 01) ** - пенополиуретановая с жестким основанием (тип 02) **
Подушка для сиденья*	- пенополиуретановая (тип 01) ** - пенополиуретановая с гелевой вставкой (тип 02) ** - пенополиуретановая с жестким основанием (тип 03) ** - пенополиуретановая с гелевой вставкой, с жестким основанием (тип 04) ** - надувная (тип 05) **.
Жесткое основание для сиденья**	
Жесткое основание для спинки**	
Ремень для фиксации голени**	
Ремень для фиксации стоп **	
Фиксатор стопы **	
Столик **	
Защитный колпак на спицы **	
Поясничный валик **	
Тростедержатель **	
Силиконовый чехол на обод заднего колеса **	
Рюкзак **	
Подставка - подушка для ног **	
Руководство по эксплуатации	
Паспорт	

Примечание – * вариант исполнения на заказ;
** при необходимости.


66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

14

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

6.3 Кресло - коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 предназначено для пользования в положении сидя и полулежа, имеет откидную спинку, регулирующую по углу наклона и по высоте, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки. Варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Размеры кресла - коляски соответствуют следующим ширинам сидений: размер 1 – 380 мм; размер 2 – 405 мм; размер 3 – 430 мм; размер 4 – 455 мм; размер 5 – 480 мм; размер 6 – 505 мм.

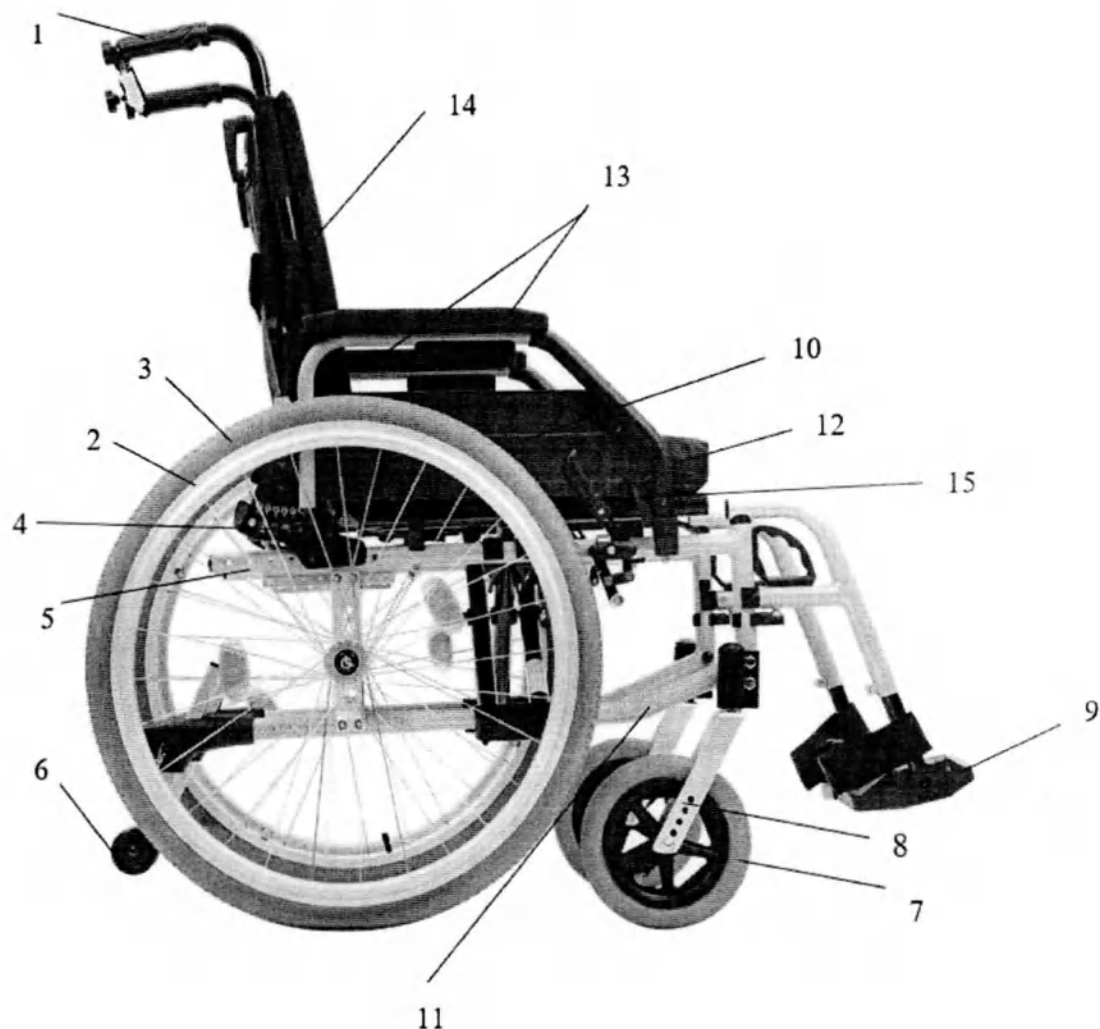

- | | |
|---|--|
| 1. Цилиндрические ручки для сопровождающего лица спинки со светоотражающей нашивкой типа 08 | 9. Опоры для стоп подножки типа 03 |
| 2. Приводной обод заднего колеса | 10. Боковой щиток подлокотника типа 02 |
| 3. Колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 | 11. Рама тип 01 |
| 4. Отверстия для регулировки наклона спинки типа 08 | 12. Подушка для сиденья тип 03 |
| 5. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по горизонтали | 13. Подлокотник тип 02 |
| 6. Антипрокидыватель тип 01 | 14. Подушка для спинки тип 01 |
| 7. Колесо переднее литое тип 01 | 15. Рычаг тормоза стояночного |
| 8. Отверстия для регулировки колеса переднего литого типа 01 | |

Рис. 3 Кресло - коляска Ortonica Recline 1000

6.3.1 Конструкция и функциональные характеристики кресла - коляски Ortonica Recline 1000 представлены в таблице 3.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

15

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Таблица 3 – Конструкция кресла - коляски Ortonica Recline 1000

Наименование	Вариант исполнения
Рама*	складная (тип 01)
	складная усиленная (тип 03)
Сиденье	регулируемое по высоте, глубине и углу наклона
Подлокотник*	съёмный, откидной, регулируемый по высоте с использованием инструмента (тип 01)
	съёмный, откидной, регулируемый по высоте кнопочным фиксатором (тип 02)
Ремень безопасности*	двухточечный с пластиковой пряжкой (тип 01)
	двухточечный с металлической пряжкой (тип 02)
	четырёхточечный (тип 03)
	пятиточечный (тип 04)
Колесо переднее*	литое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
	пневматическое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
Колесо заднее приводное со светоотражателями*	литое, быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 01)
	пневматическое, быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 01)
	литое быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 04)
	пневматическое быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 04)
Тормоз стояночный	регулируемый по горизонтали
Спинка со светоотражающей нашивкой*	одинарная, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона ремённым механизмом (тип 02)
	одинарная, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона рычагами (тип 03)
	одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона ремённым механизмом (тип 05)
	одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона рычагами (тип 06)
	двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона ремённым механизмом (тип 08)
	двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона рычагами (тип 09)
Ручки для сопровождающего лица*	цилиндрические
	анатомические
Тормоз для сопровождающего лица	на ручках для сопровождающего лица**
Транзитное колесо	съёмное**
Распорка для жесткости*	на спинке (тип 01) **
	на ручках для сопровождающего лица (тип 02) **
Подножка*	в сборе с опорой и ремнём под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съёмная, откидная (тип 01)
	в сборе с опорой и ремнём под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съёмная, откидная (тип 02)
	в сборе с опорой и ремнём под пятку, регулируемая по длине кнопочным фиксатором, съёмная, откидная (тип 03)
	в сборе с опорой и ремнём под пятку, с опорой для голени, регулируемая по углу наклона, съёмная, откидная (тип 04)
Подголовник*	съёмный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 01) **
	съёмный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 02) **
	съёмный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 03) **
	съёмный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 04) **

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

16

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 3

Боковая поддержка	съемная, мягкая, регулируемая по высоте, ширине и углу наклона, с функцией отведения**
Антипрокидыватель*	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 01)
	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 02)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 03)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по длине (тип 04)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по высоте и длине (тип 05)
Абдуктор	латеральный – медиальный**
Набор инструментов, в составе: - гаечный ключ – 1 шт.; - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.	
Насос	механический (для пневматических колес) **
	механический с манометром (для пневматических колес) **
Подушка для спинки*	- пенополиуретановая (тип 01) **
	- пенополиуретановая с жестким основанием (тип 02) **
Подушка для сиденья*	- пенополиуретановая (тип 01) **
	- пенополиуретановая с гелевой вставкой (тип 02) **
	- пенополиуретановая с жестким основанием (тип 03) **
	- пенополиуретановая с гелевой вставкой, с жестким основанием (тип 04) **
	- надувная (тип 05) **.
Жесткое основание для сиденья**	
Жесткое основание для спинки**	
Ремень для фиксации голени**	
Ремень для фиксации стоп **	
Фиксатор стопы **	
Столик **	
Защитный колпак на спицы **	
Поясничный валик **	
Тростедержатель **	
Силиконовый чехол на обод заднего колеса **	
Рюкзак **	
Подставка - подушка для ног **	
Руководство по эксплуатации	
Паспорт	

Примечание – * вариант исполнения на заказ;

** при необходимости.


66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

17

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

6.4 Кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 предназначено для пользования в положении сидя мало- подвижных пользователей, инвалидов и детей - инвалидов, в том числе больных ДЦП, имеет подголовник, боковую поддержку, абдуктор, регулируемую ориентацию сиденья, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки. Варианты исполнения отличаются комплектацией, конструкцией, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Размеры кресла - коляски соответствуют следующим ширинам сидений: размер 1 – 380 мм; размер 2 – 405 мм; размер 3 – 430 мм; размер 4 – 455 мм; размер 5 – 480 мм; размер 6 – 505 мм.

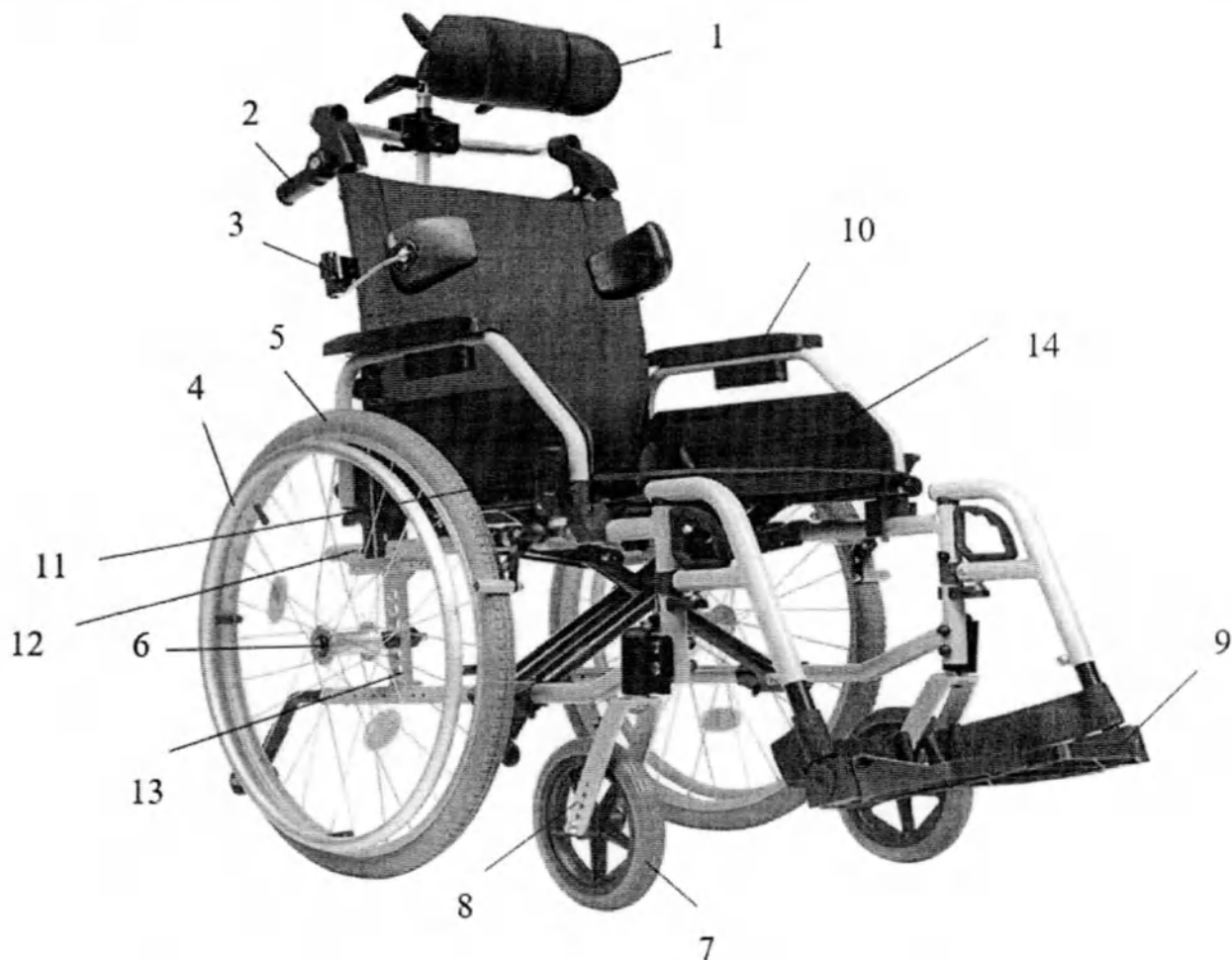

- | | |
|---|--|
| 1. Подголовник тип 03 | 8. Отверстия для регулировки колеса переднего литого типа 01 |
| 2. Цилиндрические ручки для сопровождающего лица спинки со светоотражающей нашивкой типа 09 | 9. Опоры для стоп подножки типа 04 |
| 3. Боковая поддержка | 10. Подлокотник тип 01 |
| 4. Приводной обод заднего колеса | 11. Рычаг тормоза стояночного |
| 5. Колесо заднее приводное со светоотражателем пневматическое тип 04 | 12. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по горизонтали |
| 6. Быстросъемная ось колеса заднего приводного | 13. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по вертикали |
| 7. Колесо переднее литое тип 01 | 14. Боковой щиток подлокотника типа 01 |

Рис. 4 Кресло - коляска Ortonica Comfort 1000

6.4.1 Конструкция и функциональные характеристики кресла - коляски Ortonica Comfort 1000 представлены в таблице 4.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

18

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Наименование	Вариант исполнения
Рама*	складная (тип 01)
	складная усиленная (тип 03)
Сиденье	регулируемое по высоте, глубине и углу наклона
Подлокотник*	съёмный, откидной, регулируемый по высоте с использованием инструмента (тип 01)
	съёмный, откидной, регулируемый по высоте кнопочным фиксатором (тип 02)
Ремень безопасности*	двухточечный с пластиковой пряжкой (тип 01)
	двухточечный с металлической пряжкой (тип 02)
	четырёхточечный (тип 03)
	пятиточечный (тип 04)
Колесо переднее*	литое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
	пневматическое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 01)
Колесо заднее приводное со светоотражателями*	литое, быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 01)
	пневматическое, быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 01)
	литое быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 04)
	пневматическое быстросъёмное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 04)
Тормоз стояночный	регулируемый по горизонтали
Спинка со светоотражающей нашивкой*	одинарная, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона ремённым механизмом (тип 02)
	одинарная, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона рычагами (тип 03)
	одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона ремённым механизмом (тип 05)
	одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона рычагами (тип 06)
	двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона ремённым механизмом (тип 08)
	двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте, регулируемая по углу наклона рычагами (тип 09)
Ручки для сопровождающего лица*	цилиндрические
	анатомические
Тормоз для сопровождающего лица	на ручках для сопровождающего лица**
Транзитное колесо	съёмное**
Распорка для жесткости*	на спинке (тип 01) **
	на ручках для сопровождающего лица (тип 02) **
Подножка*	в сборе с опорой и ремнём под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съёмная, откидная (тип 01)
	в сборе с опорой и ремнём под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съёмная, откидная (тип 02)
	в сборе с опорой и ремнём под пятку, регулируемая по длине кнопочным фиксатором, съёмная, откидная (тип 03)
	в сборе с опорой и ремнём под пятку, с опорой для голени, регулируемая по углу наклона, съёмная, откидная (тип 04)
Подголовник*	съёмный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 01)
	съёмный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 02)
	съёмный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 03)
	съёмный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 04)

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

19

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 4

Боковая поддержка	съемная, мягкая, регулируемая по высоте, ширине и углу наклона, с функцией отведения
Антипрокидыватель*	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 01)
	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 02)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 03)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по длине (тип 04)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по высоте и длине (тип 05)
Абдуктор	латеральный – медиальный
Набор инструментов, в составе: - гаечный ключ – 1 шт.; - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.	
Насос	механический (для пневматических колес) ** механический с манометром (для пневматических колес) **
Подушка для спинки*	- пенополиуретановая (тип 01) ** - пенополиуретановая с жестким основанием (тип 02) **
Подушка для сиденья*	- пенополиуретановая (тип 01) **
	- пенополиуретановая с гелевой вставкой (тип 02) **
	- пенополиуретановая с жестким основанием (тип 03) **
	- пенополиуретановая с гелевой вставкой, с жестким основанием (тип 04) **
	- надувная (тип 05) **.
Жесткое основание для сиденья**	
Жесткое основание для спинки**	
Ремень для фиксации голени**	
Ремень для фиксации стоп **	
Фиксатор стопы **	
Столик **	
Защитный колпак на спицы **	
Поясничный валик **	
Тростедержатель **	
Силиконовый чехол на обод заднего колеса **	
Рюкзак **	
Подставка - подушка для ног **	
Руководство по эксплуатации	
Паспорт	

Примечание – * вариант исполнения на заказ;
** при необходимости.


66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

20

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

6.5 Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 предназначено для пользования в положении сидя, управляется пациентом или сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складывается для удобства транспортировки. Варианты исполнения отличаются комплектацией, конструктивными особенностями, функциональными элементами и возможностью их регулировки. Размеры кресла - коляски соответствуют следующим ширинам сидений: размер 1 – 380 мм; размер 2 – 405 мм; размер 3 – 430 мм; размер 4 – 455 мм; размер 5 – 480 мм; размер 6 – 505 мм.

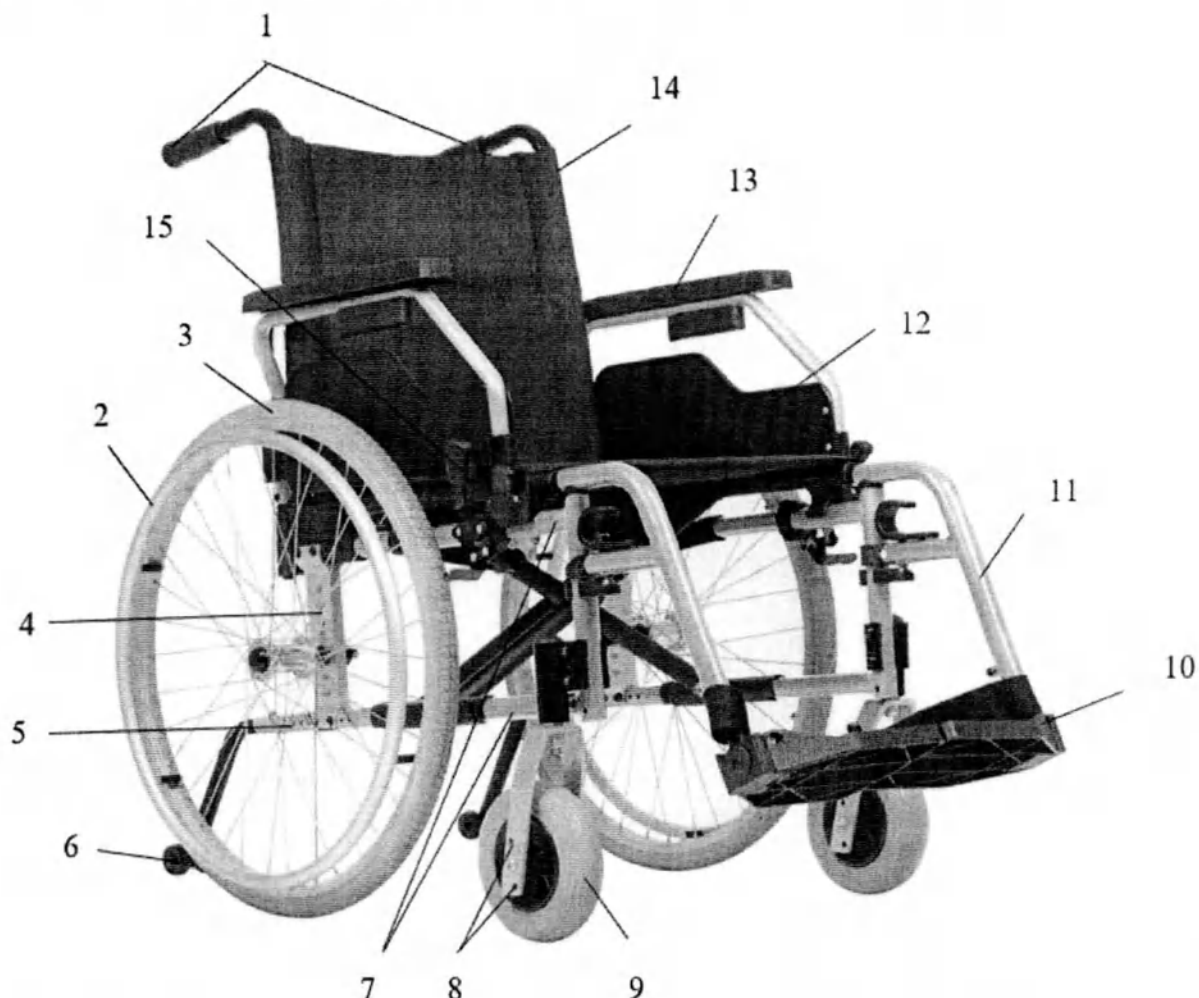

- | | |
|---|---|
| <p>1. Цилиндрические ручки для сопровождающего лица спинки со светоотражающей нашивкой типа 07</p> <p>2. Приводной обод колеса заднего</p> <p>3. Колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 02</p> <p>4. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по вертикали</p> <p>5. Отверстия для регулировки колеса заднего приводного по горизонтали</p> <p>6. Антипрокидыватель тип 04</p> <p>7. Рама тип 02</p> <p>8. Отверстия для регулировки колеса переднего пневматического типа 02</p> | <p>9. Колесо переднее пневматическое тип 02</p> <p>10. Опоры для стоп подножки типа 03</p> <p>11. Подножка тип 04</p> <p>12. Боковой щиток подлокотника типа 03</p> <p>13. Подлокотник тип 03</p> <p>14. Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими ручками для сопровождающего лица тип 07</p> <p>15. Рычаг тормоза стояночного</p> |
|---|---|

Рис. 5 Кресло - коляска Ortonica Trend 1000

6.5.1 Конструкция и функциональные характеристики кресла - коляски Ortonica Trend 1000 представлены в таблице 5.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

21

Таблица 5 – Конструкция кресла - коляски Ortonica Trend 1000

Наименование	Вариант исполнения
Рама*	складная (тип 02) складная усиленная (тип 04)
Сиденье	регулируемое по высоте, глубине и углу наклона
Подлокотник*	съемный, откидной, отводящийся назад, регулируемый по высоте с использованием инструмента (тип 03) съемный, откидной, отводящийся назад, регулируемый по высоте кнопочным фиксатором (тип 04)
Ремень безопасности*	двухточечный с пластиковой пряжкой (тип 01) двухточечный с металлической пряжкой (тип 02) четырёхточечный (тип 03) пятиточечный (тип 04)
Колесо переднее*	литое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 02) пневматическое, регулируемое по высоте и углу наклона (тип 02)
Колесо заднее приводное со светоотражателями*	литое, быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 02) пневматическое, быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали (тип 02) литое быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 05) пневматическое быстросъемное, регулируемое по вертикали и горизонтали, с тормозной барабанной системой (тип 05)
Тормоз стояночный	регулируемый по горизонтали
Спинка со светоотражающей нашивкой*	одинарная, регулируемая по высоте (тип 01) одинарная, с ремнями натяжения обшивки, регулируемая по высоте (тип 04) двойная, с ремнями натяжения спинки, регулируемая по высоте (тип 07)
Ручки для сопровождающего лица*	цилиндрические анатомические
Тормоз для сопровождающего лица	на ручках для сопровождающего лица**
Транзитное колесо	съемное**
Распорка для жесткости*	на спинке (тип 01) ** на ручках для сопровождающего лица (тип 02) **
Подножка*	в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съемная, откидная (тип 01) в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине с помощью инструмента, съемная, откидная (тип 02) в сборе с опорой и ремнем под пятку, регулируемая по длине кнопочным фиксатором, съемная, откидная (тип 03) в сборе с опорой и ремнем под пятку, с опорой для голени, регулируемая по углу наклона, съемная, откидная (тип 04)
Подголовник*	съемный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 01) ** съемный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 02) ** съемный, мягкий, трехсекционный, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы (тип 03) ** съемный, контурный из вспененного полиуретана, в сборе с кронштейном, регулируемый по высоте и углу наклона (тип 04) **
Боковая поддержка	съемная, мягкая, регулируемая по высоте, ширине и углу наклона, с функцией отведения**
Антипрокидыватель*	съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 01) съемный, с упором для сопровождающего лица, регулируемый по высоте, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 02)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.	Подп. и дата	Подп.
				убл.	убл.

66445146.942815.40.000.00.00PЭ

Лист
22

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 5

	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение (тип 03)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по длине (тип 04)
	съемный, с возможностью установки в транспортировочное положение, регулируемый по высоте и длине (тип 05)
Абдуктор	латеральный – медиальный**
Набор инструментов, в составе: - гаечный ключ – 1 шт.; - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.; - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.	
Насос	механический (для пневматических колес) ** механический с манометром (для пневматических колес) **
Подушка для спинки*	- пенополиуретановая (тип 01) ** - пенополиуретановая с жестким основанием (тип 02) **
Подушка для сиденья*	- пенополиуретановая (тип 01) ** - пенополиуретановая с гелевой вставкой (тип 02) ** - пенополиуретановая с жестким основанием (тип 03) ** - пенополиуретановая с гелевой вставкой, с жестким основанием (тип 04) ** - надувная (тип 05) **.
Жесткое основание для сиденья**	
Жесткое основание для спинки**	
Ремень для фиксации голени**	
Ремень для фиксации стоп **	
Фиксатор стопы **	
Столик **	
Защитный колпак на спицы **	
Поясничный валик **	
Тростедержатель **	
Силиконовый чехол на обод заднего колеса **	
Рюкзак **	
Подставка - подушка для ног **	
Руководство по эксплуатации	
Паспорт	

Примечание – * вариант исполнения на заказ;
** при необходимости.

Подп. и дата

дубл.

Ине

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ине. № подл.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

23

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 Основные параметры и характеристики

7.1.1 Кресло – коляска должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 51083, ГОСТ Р 51632, настоящих технических условий и производиться в соответствии с технологическим регламентом по комплектам КД, утвержденным в установленном порядке:

- Base Lite 1000 – 66445146.942815.10.000.00.00;
- Control One 1000 – 66445146.942815.20.000.00.00;
- Recline 1000 – 66445146.942815.30.000.00.00;
- Comfort 1000 – 66445146.942815.50.000.00.00;
- Trend 1000 – 66445146.942815.40.000.00.00.

7.1.2 Характеристики кресла - коляски соответствуют указанным в таблице 6.

Таблица 6 - Характеристики кресла - коляски с ручным приводом складного Ortonica

Наименование показателя	Base Lite 1000	Control One 1000	Recline 1000	Comfort 1000	Trend 1000
Габаритная ширина кресла - коляски, ±10 мм	590, 620, 650, 675, 700, 730, 745, 775, 795, 820	615, 630, 665, 680, 720, 740	590, 620, 650, 675, 700, 730	590, 620, 645, 675, 700, 730	565, 580, 605, 630, 660, 690
Ширина сиденья, ±10 мм*	380, 405, 430, 455, 480, 505, 530, 560, 585, 610	380, 405, 430, 455, 480, 505	380, 405, 430, 455, 480, 505	380, 405, 430, 455, 480, 505	380, 405, 430, 455, 480, 505
Эффективная ширина сиденья, ±10 мм	390, 410, 440, 460, 490, 510, 535, 565, 590, 615	390, 410, 440, 460, 490, 510	390, 410, 440, 460, 490, 510	390, 410, 440, 460, 490, 510	400, 405, 430, 465, 500, 525
Угол наклона плоскости сиденья, ±5 ^{0**}	минус 10/+10				минус 10/ +20
Габаритная высота кресла - коляски, ±10 мм**	840-1050	855-1055	990-1270	990-1270	885-1105
Полная габаритная длина кресла - коляски, ±10 мм	1190				
Ширина кресла – коляски в сложенном состоянии, ±10 мм	330	345	330	330	280
Высота кресла – коляски в сложенном состоянии, ±10 мм	710, 710, 730, 750, 775, 795, 820, 845, 865, 895	720, 720, 740, 745, 770, 795	720, 720, 720, 750, 770, 795	720, 720, 720, 750, 770, 795	735, 735, 735, 750, 760, 770
Длина кресла – коляски в сложенном состоянии, ±10 мм	840 (размер 1-6); 875 (размер 7-10)	840			790
Эффективная глубина сиденья, ±10 мм**	430-530 (размер 1-6); 465-540 (размер 7-10)	430-530	455-580		420-480
Шаг регулировки, мм	25				15
Кол-во шагов	4 (размер 1-6); 3 (размер 7-10)	4	5	5	4
Кол-во положений	5 (размер 1-6); 4 (размер 7-10)	5	6	6	5
Высота сиденья, ±10 мм**	460-500				470-545
Кол-во шагов	3				5
Кол-во положений	4				6
Высота спинки, ±15 мм**	410-510	410-510	510-610	510-610	450-550
Шаг регулировки, мм	25				
Кол-во шагов	4				
Кол-во положений	5				
Угол наклона спинки, ±1 ^{0**}	90	90	90-140	90-140	90
Шаг регулировки, угол ⁰	-	-	10	10	-
Кол-во шагов	-	-	5	5	-

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

24

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 6

Кол-во положений	-	-	6	6	-
Расстояние между подголовником и спинкой, ±10 мм	150/80				
Высота подлокотника, ±5 мм**	225-255 (тип 01); 240-310 (тип 02)			240-270 (тип 03); 250-320 (тип 04)	
Шаг регулировки, мм	15 (тип 01); 10 (тип 02)			15 (тип 03); 10 (тип 04)	
Кол-во шагов	2 (тип 01); 7 (тип 02)			2 (тип 03); 7 (тип 04)	
Кол-во положений	3 (тип 01); 8 (тип 02)			3 (тип 03); 8 (тип 04)	
Расстояние от переднего края подлокотника до спинки, ±10 мм	280/390 (тип 01); 310/420 (тип 02)			280/390 (тип 03); 310/420 (тип 04)	
Шаг регулировки, мм	55 (тип 01) 36,5 (тип 02)			55 (тип 03) 36,5 (тип 04)	
Кол-во шагов	2 (тип 01); 3 (тип 02)			2 (тип 03) 3 (тип 04)	
Кол-во положений	3 (тип 01); 4 (тип 02)			3 (тип 03); 4 (тип 04)	
Масса нетто, кг, не более	25,0				
Масса брутто, кг, не более	30,0				
Масса самой тяжелой части кресла – коляски (рамы), кг, не более	12				
Максимальная масса пользователя, кг	125 (размер 1-6); 150 (размер 7-10)	125			
Механическая нагрузка, Н	1250 (размер 1-6); 1500 (размер 7-10)	1250			
Высота препятствия с грузом, мм, не более	40				
Длина подножки, ±10 мм:					
- тип 01, 02**;	340-480				
- тип 03**;	410-440				
- тип 04**.	350-500				
Тип регулировки:					
- тип 01, 02;	плавная				
- тип 03, 04.	ступенчатая				
Кол-во шагов:					
- тип 03;	1				
- тип 04.	7				
Кол-во положений:					
- тип 03;	2				
- тип 04.	8				
Угол наклона подножки к поверхности сиденья, ±10°					
- тип 01, 02, 03;	110				
- тип 04**.	114-180				
Диаметр обода ручного привода, ±10 мм	530	450/530	530	530	525
Диаметр ведущего (фиксированного) колеса, ±10 мм	600				
Диаметр самоориентирующегося колеса, ±10 мм	200			180	

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

25

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 6

Диапазон регулирования переднего колеса по вертикали, ± 10 мм	43 (размер 1-9); 54 (размер 10)	43	80
Шаг регулировки, мм	14 (размер 1-9); 27 (размер 10)	14	16
Кол-во шагов	4/3 рабочих (размер 1-9); 2 (размер 10)	4/3 рабочих	5
Кол-во положений	5/4 рабочих (размер 1-9); 3 (размер 10)	5/4 рабочих	6
Вертикальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	100		120
Шаг регулировки, мм	20		
Кол-во шагов	5		6
Кол-во положений	6		7
Горизонтальное положение оси ведущего колеса, ± 10 мм	120		105
Шаг регулировки, мм	20		15
Кол-во шагов	6		7
Кол-во положений	7		8
Ширина колеи самоориентирующегося колеса, ± 10 мм	455, 455, 480, 505, 530, 560, 575, 605, 630, 650	455, 455, 480, 505, 530, 560	430, 445, 465, 485, 520, 550
Ширина колеи приводных колес, ± 10 мм	540, 540, 565, 585, 615, 620, 660, 680, 705, 730	540, 540, 565, 585, 615, 620	475, 495, 520, 545, 570, 600
Клиренс загруженного кресла – коляски, мм, не менее	30		

Примечание – * Размерный ряд кресла - коляски соответствует ширине сиденья:

размер 1 – 380 мм;
размер 2 – 405 мм;
размер 3 – 430 мм;
размер 4 – 455 мм;
размер 5 – 480 мм;
размер 6 – 505 мм;
размер 7 – 530 мм;
размер 8 – 560 мм;
размер 9 – 585 мм;
размер 10 – 610 мм.

** Регулировка осуществляется в пределах указанного диапазона.

7.1.3 Ширина вращения кресла - коляски не более 1410 мм.

7.1.4 Значения усилий, необходимых для трогания с места кресла - коляски, нагруженного манекеном массой 100 ± 1 кг на ровной поверхности:

- к ручкам спинки – не более 100 Н;
- к ободу каждого из ведущих колес – не более 40 Н.

7.1.5 Значение усилия, необходимого для перемещения кресла - коляски, нагруженного манекеном, движущегося со скоростью 1 м/с в заданном направлении по ровной поверхности (плиточное, асфальтовое, бетонное и т.п. покрытия) – не более 45 Н.

7.1.6 Значения усилий, необходимых для фиксации кресла - коляски в определенных положениях и его элементов, не превышает:

- для складывания (раскладывания) кресла - коляски – 60 Н;

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

26

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

– для закрепления спинки кресла - коляски – 80 Н (при этом спинка не откидывается при приложении усилия 200 Н);

– для регулирования длины и угла наклона подножки – 100 Н.

7.1.7 При движении ненагруженного кресла - коляски по инерции на пути в 3 м значение отклонения от «нулевой» линии (боковой увод) не превышает 500 мм.

7.1.8 Кресло - коляска соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8.

7.1.9 После падения кресла - коляски в сложенном состоянии с высоты до 1 м не обнаружено какой-либо остаточной деформации, способной ухудшить эксплуатационные свойства кресла - коляски и его составных частей

7.1.10 Нагруженное манекеном кресло - коляска с включенной тормозной системой обладает статической устойчивостью в продольном направлении движения вперед и назад, а также боковой статической устойчивостью не менее 10°.

7.1.11 Кресло – коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не более 1 мм.

7.1.12 Стояночная тормозная система обеспечивает надежное удержание загруженного кресла - коляски в заторможенном состоянии на плоскости. Предельный угол наклона для случаев задней, передней и боковой устойчивости кресла - коляски – не менее 10°.

7.1.13 Значение усилия для торможения ведущих колес, прилагаемого к рукоятке стояночного тормоза – не более 60 Н, а к рукоятке рабочего тормоза – не более 100 Н.

7.1.14 Ведущие колеса кресла - коляски вращаются на горизонтальной оси без заеданий при приложении усилия – не более 0,35 Н, а в зафиксированном состоянии не проворачиваются при приложении усилия – 150 ± 1 Н.

7.1.15 Ведущие колеса имеют следующие значения параметров:

– развал – не более 2°;

– схождение – не более 1°;

– концентричность и биение – не более 1 % радиуса колеса.

7.1.16 Поворотные колеса – самоцентрирующиеся и проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.

7.1.17 Кресло – коляска имеет ограничители, предохраняющие от опрокидывания.

7.1.18 Кресло – коляска работоспособно в процессе эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до +40 °С и относительной влажности 98 % при температуре +25 °С.

7.1.19 Кресло – коляска исправно при резком изменении значений температуры внешней среды в диапазоне от +20 °С до минус 40 °С в течение 15 мин.

7.1.20 Кресло – коляска исправно после воздействия на него вибрационной нагрузки амплитудой перемещения 0,35 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц.

7.1.21 Кресло – коляска исправно после воздействия на него в упаковке для транспортирования следующих климатических и механических нагрузок:

а) температура окружающего воздуха от минус 50 °С до +50 °С;

б) относительная влажность воздуха 100 % при температуре +25 °С;

в) вибрационная нагрузка амплитудой перемещения 0,35 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц;

г) ударная нагрузка с пиковым ударным ускорением 10 g при длительности действия ударного ускорения 16 мс.

7.1.22 Кресло - коляска устойчиво к санитарно - гигиенической обработке и очистке. Методы очистки и соответствующие чистящие и дезинфицирующие материалы содержатся в настоящем руководстве по эксплуатации.

7.1.23 Наружные поверхности кресла - коляски устойчивы к воздействию 1% – го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

27

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

7.1.24 Металлические и неметаллические неорганические покрытия – по ГОСТ 9.303 для условий эксплуатации 1.

Лакокрасочные покрытия – по ГОСТ 9.104 для условий эксплуатации У1.1.

7.1.25 Конструкция кресла – коляски обеспечивает удобное размещение в нем одного пользователя и свободу движений в пределах зоны досягаемости.

7.1.26 Конструкция кресла – коляски обеспечивает ремонтпригодность и удобство обслуживания, включая в первую очередь доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

7.1.27 Среднее время восстановления работоспособного состояния при замене неисправной детали (элемента) на исправное – не более 2 часов.

За предельное состояние принимают состояние кресла - коляски, при котором восстановление его работоспособности невозможно, либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового кресла - коляски).

7.1.28 Средняя наработка кресла – коляски на отказ составляет не менее 5 000 ч.

Отказом кресла – коляски является нарушение его работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, повлекшее за собой отклонение параметров за заявленные пределы, если при этом для восстановления работоспособного состояния необходимо заменить или отремонтировать какую – либо составную часть.

7.1.29 Конструкция каркаса (рамы) кресла - коляски обеспечивает складывание кресла – коляски для хранения и транспортирования без применения специального инструмента.

7.1.30 Изготовителем предусмотрена разборка кресла – коляски для хранения или/и транспортирования с возможностью собрать кресло – коляску таким способом, который не повлечет за собой опасность для пользователя; используются крепления, ослабленные (освобожденные) при разборке не одноразового использования (к креплениям одноразового использования относят шурупы и саморезные винты).

7.1.31 Элементы конструкции кресла – коляски, имеющие контакт с кожей пользователя или сопровождающего лица устойчивы к воздействию пота, а имеющие контакт с нижней частью тела пользователя устойчивы к воздействию мочи.

7.1.32 Резьбовые соединения доступны для регулирования и надежно затянуты. Значение затяжки указывают в КД и контролируют при сборке.

7.1.33 Подвижные соединения отрегулированы и имеют плавный ход без заеданий.

Трущиеся поверхности подвижных соединений смазывают при сборке в соответствии с технологической документацией, утвержденной в установленном порядке.

Места и вид смазки указывают в КД.

7.1.34 Элементы кресла - коляски с мягкой обивкой (сиденья, спинки, подушки, ремни безопасности и т.д.) изготавливаются из пожаробезопасных материалов, стойкими к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 7176-16.

7.1.35 Кресло - коляска по биологической безопасности и совместимости материалов, применяемых для его изготовления и элементов конструкции, контактирующих с организмом человека, соответствует ГОСТ Р 52770, ГОСТ ISO 10993-1.

7.1.36 Для безопасного движения в сумерках и темное время суток на кресле – коляске установлены световозвращающие элементы (светоотражатели на задних приводных колесах, световозвращающая нашивка на спинке).

7.1.37 В конструкции кресла – коляски для инвалидов, детей - инвалидов, больных ДЦП, имеющих выраженные или значительно выраженные нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний, предусмотрены системы опоры тела в соответствии с ГОСТ Р 58522:

- сиденье с регулируемой глубиной и углом наклона;
- опора спины с регулируемой высотой и углом наклона;
- подлокотники;
- сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте и углу наклона

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

28

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

опорой стопы (длиной подножки);

- система фиксации с использованием ремней безопасности;
- жесткое сиденье и жесткая опора спины;
- регулируемый подголовник (высота расположения и степень ограничения движения);
- боковые поддержки, регулируемые по высоте, ширине и углу наклона;
- опора среднего положения верхней части ног (абдуктор для сохранения зазора между ногами).

Системы опоры тела позволяют обеспечить правильную позу в сидячем положении в течение длительного времени.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв	рубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
29

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки медицинского изделия кресла - коляски с ручным приводом складного Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 соответствует следующему ниже.

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения:

1. Кресло - коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000 в составе:

1.1 Кресло - коляска Ortonica Base Lite 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1 шт. в составе:

1.1.1. Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 – 1 шт. (при необходимости).

1.1.2 Сиденье – 1 шт.

1.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

1.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

1.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).

1.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

– колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 04 – 2 шт. (при необходимости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

1.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

1.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 – 1 шт. (при необходимости).

1.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).

1.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).

1.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):

– распорка для жесткости тип 01 – 1 шт.;

– распорка для жесткости тип 02 – 1 шт.

1.6 Подножка в вариантах исполнения:

– подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

30

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

- подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
- подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).
- 1.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):
- подголовник тип 01 – 1 шт.;
- подголовник тип 02 – 1 шт.;
- подголовник тип 03 – 1 шт.;
- подголовник тип 04 – 1 шт.
- 1.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).
- 1.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:
- антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
- антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).
- 1.10 Абдуктор - 1 шт. (при необходимости).
- 1.11 Набор инструментов, в составе:
- гаечный ключ – 1 шт.;
- ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;
- ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;
- ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.
- 1.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):
- механический – 1 шт.;
- механический с манометром – 1 шт.
- 1.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):
- подушка для спинки тип 01 – 1 шт.;
- подушка для спинки тип 02 – 1 шт.
- 1.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.
- 1.15 Жесткое основание для сиденья (при необходимости) – 1 шт.
- 1.16 Жесткое основание для спинки (при необходимости) – 1 шт.
- 1.17 Ремень для фиксации голени (при необходимости) – 1 шт.
- 1.18 Ремень для фиксации стоп (при необходимости) – 1 шт.
- 1.19 Фиксатор стопы (при необходимости) – 2 шт.
- 1.20 Столик (при необходимости) – 1 шт.
- 1.21 Защитный колпак на спицы (при необходимости) – 2 шт.
- 1.22 Поясничный валик (при необходимости) – 1 шт.
- 1.23 Тростедержатель (при необходимости) – 1 шт.
- 1.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса (при необходимости) – 2 шт.
- 1.25 Рюкзак (при необходимости) – 1 шт.
- 1.26 Подставка - подушка для ног (при необходимости) – 1 шт.
- 1.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 1.28 Паспорт – 1 шт.
- 2. Кресло - коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000 в составе:
- 2.1 Кресло - коляска Ortonica Control One 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1 шт. в составе:
- 2.1.1. Рама в вариантах исполнения:
- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 – 1 шт. (при необходимости).

Инв. № подл.	Подп. и дата	
	губл.	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
31

- 2.1.2 Сиденье – 1 шт.
- 2.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:
- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).
- 2.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:
- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
 - ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
 - ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
 - ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).
- 2.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:
- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).
- 2.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
- 2.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.
- 2.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
 - спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
 - спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 – 1 шт. (при необходимости).
- 2.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).
- 2.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).
- 2.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):
- распорка для жесткости тип 01 – 1 шт.;
 - распорка для жесткости тип 02 – 1 шт.
- 2.6 Подножка в вариантах исполнения:
- подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).
- 2.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):
- подголовник тип 01 – 1 шт.;
 - подголовник тип 02 – 1 шт.;
 - подголовник тип 03 – 1 шт.;
 - подголовник тип 04 – 1 шт.
- 2.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).
- 2.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:
- антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).
- 2.10 Абдуктор -1 шт. (при необходимости).
- 2.11 Набор инструментов, в составе:
- гаечный ключ – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине	бл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
32

- ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;
- ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.
- 2.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):
- механический – 1 шт.;
- механический с манометром – 1 шт.
- 2.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):
- подушка для спинки тип 01 - 1 шт.;
- подушка для спинки тип 02 - 1 шт.
- 2.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):
- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.
- 2.15 Жесткое основание для сиденья (при необходимости) – 1 шт.
- 2.16 Жесткое основание для спинки (при необходимости) – 1 шт.
- 2.17 Ремень для фиксации голени (при необходимости) – 1 шт.
- 2.18 Ремень для фиксации стоп (при необходимости) – 1 шт.
- 2.19 Фиксатор стопы (при необходимости) – 2 шт.
- 2.20 Столик (при необходимости) – 1 шт.
- 2.21 Защитный колпак на спицы (при необходимости) – 2 шт.
- 2.22 Поясничный валик (при необходимости) – 1 шт.
- 2.23 Тростедержатель (при необходимости) – 1 шт.
- 2.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса (при необходимости) – 2 шт.
- 2.25 Рюкзак (при необходимости) – 1 шт.
- 2.26 Подставка - подушка для ног (при необходимости) – 1 шт.
- 2.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 2.28 Паспорт – 1 шт.
- 3. Кресло - коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline

1000 в составе:

- 3.1 Кресло - коляска Ortonica Recline 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 шт. в составе:
- 3.1.1. Рама в вариантах исполнения:
- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.1.2 Сиденье – 1 шт.
- 3.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:
- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости),
- подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).
- 3.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:
- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).
- 3.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:
- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).
- 3.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 04 – 2 шт. (при необходимости);

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

33

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

мости);

– колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

3.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

3.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 02 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 03 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 05 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 06 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 08 – 1 шт. (при необходимости);

– спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 09 – 1 шт. (при необходимости).

3.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).

3.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).

3.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):

– распорка для жесткости тип 01 – 1 шт.;

– распорка для жесткости тип 02 – 1 шт.

3.6 Подножка в вариантах исполнения:

– подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

3.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):

– подголовник тип 01 – 1 шт.;

– подголовник тип 02 – 1 шт.

– подголовник тип 03 – 1 шт.;

– подголовник тип 04 – 1 шт.

3.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).

3.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:

– антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);

– антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).

3.10 Абдуктор -1 шт. (при необходимости).

3.11 Набор инструментов, в составе:

– гаечный ключ – 1 шт.;

– ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;

– ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.

3.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):

– механический – 1 шт.;

– механический с манометром – 1 шт.

3.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):

– подушка для спинки тип 01 - 1 шт.;

– подушка для спинки тип 02 - 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине	публ.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
34

3.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):

- подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
- подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.

3.15 Жесткое основание для сиденья (при необходимости) – 1 шт.

3.16 Жесткое основание для спинки (при необходимости) – 1 шт.

3.17 Ремень для фиксации голени (при необходимости) – 1 шт.

3.18 Ремень для фиксации стоп (при необходимости) – 1 шт.

3.19 Фиксатор стопы (при необходимости) – 2 шт.

3.20 Столик (при необходимости) – 1 шт.

3.21 Защитный колпак на спицы (при необходимости) – 2 шт.

3.22 Поясничный валик (при необходимости) – 1 шт.

3.23 Тростедержатель (при необходимости) – 1 шт.

3.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса (при необходимости) – 2 шт.

3.25 Рюкзак (при необходимости) – 1 шт.

3.26 Подставка - подушка для ног (при необходимости) – 1 шт.

3.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.28 Паспорт – 1 шт.

4. Кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей-инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000 в составе:

4.1 Кресло - коляска Ortonica Comfort 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 шт. в составе:

4.1.1. Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 03 – 1 шт. (при необходимости).

4.1.2 Сиденье – 1 шт.

4.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 01 – 2 шт. (при необходимости),
- подлокотник тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

4.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

4.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости).

4.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

4.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

4.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

35

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

- 4.16 Жесткое основание для спинки (при необходимости) – 1 шт.
- 4.17 Ремень для фиксации голени (при необходимости) – 1 шт.
- 4.18 Ремень для фиксации стоп (при необходимости) – 1 шт.
- 4.19 Фиксатор стопы (при необходимости) – 2 шт.
- 4.20 Столик (при необходимости) – 1 шт.
- 4.21 Защитный колпак на спицы (при необходимости) – 2 шт.
- 4.22 Поясничник валик (при необходимости) – 1 шт.
- 4.23 Тростедержатель (при необходимости) – 1 шт.
- 4.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса (при необходимости) – 2 шт.
- 4.25 Рюкзак (при необходимости) – 1 шт.
- 4.26 Подставка - подушка для ног (при необходимости) – 1 шт.
- 4.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 4.28 Паспорт – 1 шт.

5. Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000 в составе:

5.1 Кресло - коляска Ortonica Trend 1000, размер 1, 2, 3, 4, 5, 6 в составе:

5.1.1. Рама в вариантах исполнения:

- рама тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- рама тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

5.1.2 Сиденье – 1 шт.

5.1.3 Подлокотник в вариантах исполнения:

- подлокотник тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
- подлокотник тип 04 – 2 шт. (при необходимости).

5.1.4 Ремень безопасности в вариантах исполнения:

- ремень безопасности тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
- ремень безопасности тип 04 – 1 шт. (при необходимости).

5.1.5 Колесо переднее в вариантах исполнения:

- колесо переднее литое тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо переднее пневматическое тип 02 – 2 шт. (при необходимости).

5.1.6 Колесо заднее приводное со светоотражателями в вариантах исполнения:

- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями литое тип 05 – 2 шт. (при необходимости);
- колесо заднее приводное со светоотражателями пневматическое тип 05 – 2 шт. (при необходимости).

5.1.7 Тормоз стояночный – 2 шт.

5.2 Спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица в вариантах исполнения:

- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 04 – 1 шт. (при необходимости);
- спинка со светоотражающей нашивкой, с цилиндрическими/анатомическими ручками для сопровождающего лица тип 07 – 1 шт. (при необходимости).

5.3 Тормоз для сопровождающего лица – 2 шт. (при необходимости).

5.4 Транзитное колесо – 2 шт. (при необходимости).

5.5 Распорка для жесткости в вариантах исполнения (при необходимости):

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

37

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

- распорка для жесткости тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
- распорка для жесткости тип 02 – 1 шт. (при необходимости).
- 5.6 Подножка в вариантах исполнения:
 - подножка тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - подножка тип 04 – 2 шт. (при необходимости).
- 5.7 Подголовник в вариантах исполнения (при необходимости):
 - подголовник тип 01 – 1 шт. (при необходимости);
 - подголовник тип 02 – 1 шт. (при необходимости);
 - подголовник тип 03 – 1 шт. (при необходимости);
 - подголовник тип 04 – 1 шт. (при необходимости).
- 5.8 Боковая поддержка – 2 шт. (при необходимости).
- 5.9 Антипрокидыватель в вариантах исполнения:
 - антипрокидыватель тип 01 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 02 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 03 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 04 – 2 шт. (при необходимости);
 - антипрокидыватель тип 05 – 2 шт. (при необходимости).
- 5.10 Абдуктор – 1 шт. (при необходимости).
- 5.11 Набор инструментов, в составе:
 - гаечный ключ – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.;
 - ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.
- 5.12 Насос в вариантах исполнения (при необходимости):
 - механический – 1 шт.;
 - механический с манометром – 1 шт.
- 5.13 Подушка для спинки в вариантах исполнения (при необходимости):
 - подушка для спинки тип 01 – 1 шт.;
 - подушка для спинки тип 02 – 1 шт.
- 5.14 Подушка для сиденья в вариантах исполнения (при необходимости):
 - подушка для сиденья тип 01 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 02 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 03 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 04 – 1 шт.;
 - подушка для сиденья тип 05 – 1 шт.
- 5.15 Жесткое основание для сиденья – 1 шт. (при необходимости).
- 5.16 Жесткое основание для спинки – 1 шт. (при необходимости).
- 5.17 Ремень для фиксации голени – 1 шт. (при необходимости).
- 5.18 Ремень для фиксации стоп – 1 шт. (при необходимости).
- 5.19 Фиксатор стопы – 2 шт. (при необходимости).
- 5.20 Столик – 1 шт. (при необходимости).
- 5.21 Защитный колпак на спицы – 2 шт. (при необходимости).
- 5.22 Поясничный валик – 1 шт. (при необходимости).
- 5.23 Тростедержатель – 1 шт. (при необходимости).
- 5.24 Силиконовый чехол на обод заднего колеса – 2 шт. (при необходимости).
- 5.25 Рюкзак – 1 шт. (при необходимости).
- 5.26 Подставка - подушка для ног – 1 шт. (при необходимости).
- 5.27 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 5.28 Паспорт – 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

9 НАЛИЧИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1 Элементы кресла - коляски, имеющие контакт с пациентом и обслуживающим персоналом, изготовлены или имеют покрытия из материалов, разрешенных к применению в медицинской практике, безопасность которых подтверждена в установленном порядке сертификатом соответствия, декларацией о соответствии или протоколом испытаний.

9.2 Материалы, применяемые для изготовления кресла - коляски, не содержат токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла - коляски при ее нормальной эксплуатации.

9.3 Основные материалы, применяемые для элементов кресла - коляски, контактирующих менее 24 часов с неповрежденной кожей человека представлены в таблице 7.

9.4 Металлические части кресла - коляски изготовлены из коррозионностойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302.

9.5 Кресло - коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 51632 в отношении чистки и дезинфекции кресла - коляски.

9.6 Материалы животного или человеческого происхождения в медицинском изделии кресло - коляска отсутствуют.

9.7 Лекарственные средства, фармацевтические субстанции в медицинском изделии кресло - коляска отсутствуют.

Таблица 7 – Перечень применяемых материалов, контактирующих менее 24 часов с неповрежденной кожей человека.

Вариант исполнения	Используемый материал
1. Кресло – коляска с ручным приводом складное базовое Ortonica Base Lite 1000	Алюминиевый сплав марки АД31, ГОСТ 4784, производитель ООО «АВА-ТРЕЙД», РФ - приводной обод заднего колеса тип 01; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045 HR, серый глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок» – рама тип 01, 03; подножка тип 01, 02, 03, 04.
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. КНР - приводной обод заднего колеса тип 01, 04; антипрокидыватель тип 01, 02; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045, серый глянец, производитель Jinhu Color Powder CO.LTD - подножка тип 01, 02, 03, 04
	Сталь листовая углеродистая 08 ПС, ГОСТ 16523, производитель ПАО «Северсталь», РФ - металлическая пряжка ремня безопасности тип 02; набор инструментов; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 9005 Classic, черный глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», РФ – антипрокидыватель тип 01, 02, 03, 04, 05
	Ткань Oxford, HR6A3, 100% ПВХ, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – сиденье; спинка тип 01, 04, 07; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Ткань полиэфирная 100 % «DIONYSUS», ТУ13.20.31-053-50899365-2020, черная, производитель ООО "БТК Текстиль", РФ – сиденье; спинка тип 01, 04, 07; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Кожзаменитель марки Ecotap, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. КНР – подголовник тип 03
	Винилискожа мебельная ВИК-ТР «Эврика» по ТУ 13.96.14-025-0030030-2018, АО «Искож», РФ – подголовник тип 01
	Стропа Veritas S-580, полипропилен 100 %, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

39

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 7

	Стропа Ekoflex, полипропилен 100 %, черная, ГОСТ 3487, производитель ООО «ПК Ультратекс», РФ – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited, КНР - боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; опора для стоп; фиксатор подголовника; насос
	Полипропилен Бален PP H030 GP/3, ТУ 2211-074-05766563-2015, производитель ПАО «Уфаоргсинтез», РФ – боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; опора для стоп; фиксатор подголовника
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd., КНР – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 04; боковая поддержка; рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	Полиуретан Эпалан 60А, ГОСТ 24621, производитель ООО «РТ- Эпафлекс», РФ – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 02; боковая поддержка
	Термозластопласт Masflex 60109, ГОСТ Р 53533, производитель ООО «Руспласт», РФ - рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	ЛДСП, цвет «Белый фон», ГОСТ 32289, производитель ООО «Дятково-ДОЗ», РФ - столешница
	Термопластичный полиуретан (ТПУ) марки BT 65 и нейлон, производитель Xiamen Senyang Co., Ltd., China - подушка для сиденья тип 05 (Подушка противоположные с надувными ячейками Ortonica Easy Pad E80, РУ №РЗН 2018/6844)
2. Кресло - коляска с односторонним ручным приводом (для управления одной рукой) складное Ortonica Control One 1000	Алюминиевый сплав марки АДЗ1, ГОСТ 4784, производитель ООО «АВА-ТРЕЙД», РФ - приводной обод заднего колеса тип 03; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045 HR, серый глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок» – рама тип 01, 03; подножка тип 01, 02, 03, 04
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. КНР - приводной обод заднего колеса тип 03; антипрокидыватель тип 01, 02; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045, серый глянец, производитель Jinhu Color Powder CO.LTD - подножка тип 01, 02, 03, 04
	Сталь листовая углеродистая 08 ПС, ГОСТ 16523, производитель ПАО «Северсталь», РФ - металлическая пряжка ремня безопасности тип 02; набор инструментов; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 9005 Classic, черный глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», РФ – антипрокидыватель тип 01, 02, 03, 04, 05
	Ткань Oxford, HR6A3, 100% PBX, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – сиденье; спинка тип 01, 04, 07; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Ткань полиэфирная 100 % «DIONYSUS», ТУ 13.20.31-053-50899365-2020, черная, производитель ООО «БТК Текстиль», РФ – сиденье; спинка тип 01, 04, 07; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Кожзаменитель марки Ecotap, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. КНР – подголовник тип 03
	Винилискожа мебельная ВИК-ТР «Эврика» по ТУ 13.96.14-025-0030030-2018, АО «Искож», РФ – подголовник тип 01
	Стропа Veritas S-580, полипропилен 100 %, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	Стропа Ekoflex, полипропилен 100 %, черная, ГОСТ 3487, производитель ООО «ПК Ультратекс», РФ – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

40

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 7

	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited, КНР - боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; опора для стоп; фиксатор подголовника; насос
	Полипропилен Бален PP H030 GP/3, ТУ 2211-074-05766563-2015, производитель ПАО «Уфаоргсинтез», РФ – боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; опора для стоп; фиксатор подголовника
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd., КНР – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 04; боковая поддержка; рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	Полиуретан Эпалан 60А, ГОСТ 24621, производитель ООО «РТ- Эпафлекс», РФ – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 02; боковая поддержка
	Термоэластопласт Masflex 60109, ГОСТ Р 53533, производитель ООО «Руспласт», РФ - рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	ЛДСП, цвет «Белый фон», ГОСТ 32289, производитель ООО «Дятково-ДОЗ», РФ – столешница
	Термопластичный полиуретан (ТПУ) марки BT 65 и нейлон, производитель Xiamen Senyang Co., Ltd., China - подушка для сиденья тип 05 (Подушка противопролежневые с надувными ячейками Ortonica Easy Pad E80, РУ №РЗН 2018/6844)
3. Кресло - коляска с ручным приводом складное с откидной спинкой Ortonica Recline 1000	Алюминиевый сплав марки АДЗ1, ГОСТ 4784-19, производитель ООО «АВА-ТРЕЙД», РФ - приводной обод заднего колеса тип 01; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045 HR, серый глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок» – рама тип 01, 03; подножка тип 01, 02, 03, 04.
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. КНР - приводной обод заднего колеса тип 01, 04; антипрокидыватель тип 01, 02; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045, серый глянец, производитель Jinhu Color Powder CO.LTD - подножка тип 01, 02, 03, 04
	Сталь листовая углеродистая 08 ПС, ГОСТ 16523, производитель ПАО «Северсталь», РФ - металлическая пряжка ремня безопасности тип 02; набор инструментов; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 9005 Classic, черный глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», РФ – антипрокидыватель тип 01, 02, 03, 04, 05
	Ткань Oxford, HR6A3, 100% ПВХ, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – сиденье; спинка тип 02, 03, 05, 06, 08, 09; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01 ,02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Ткань полиэфирная 100 % «DIONYSUS», ТУ 13.20.31-053-50899365-2020, черная, производитель ООО «БТК Текстиль», РФ – сиденье; спинка тип 02, 03, 05, 06, 08, 09; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03 ,04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Кожзаменитель марки Ecotar, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. КНР – подголовник тип 03
	Винилискожа мебельная ВИК-ТР «Эврика» по ТУ 13.96.14-025-0030030-2018, АО «Искож», РФ – подголовник тип 01
	Стропа Veritas S-580, полипропилен 100 %, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	Стропа Ekoflex, полипропилен 100 %, черная, ГОСТ 3487, производитель ООО «ПК Ультратекс», РФ – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited, КНР - боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; опора для стоп; фиксатор подголовника; насос

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

41

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 7

	Полипропилен Бален PP H030 GP/3, ТУ 2211-074-05766563-2015, производитель ПАО «Уфаоргсинтез», РФ – боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; опора для стоп; фиксатор подголовника
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd., КНР – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 04; боковая поддержка; рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	Полиуретан Эпалан 60А, ГОСТ 24621, производитель ООО «РТ-Эпафлекс», РФ – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 02; боковая поддержка
	Термоэластопласт Masflex 60109, ГОСТ Р 53533, производитель ООО «Руспласт», РФ – рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	ЛДСП, цвет «Белый фон», ГОСТ 32289, производитель ООО «Дятьково-ДОЗ», РФ – столешница
	Термопластичный полиуретан (ТПУ) марки BT 65 и нейлон, производитель Xiamen Senyang Co., Ltd., China – подушка для сиденья тип 05 (Подушка противопролежневые с надувными ячейками Ortonica Easy Pad E80, РУ №РЗН 2018/6844)
4. Кресло - коляска с ручным приводом складное с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, для инвалидов и детей - инвалидов, в том числе для больных ДЦП, Ortonica Comfort 1000	Алюминиевый сплав марки АД31, ГОСТ 4784, производитель ООО «АВА-ТРЕЙД», РФ – приводной обод заднего колеса тип 01; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045 HR, серый глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок» – рама тип 01, 03; подножка тип 01, 02, 03, 04.
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. КНР – приводной обод заднего колеса тип 01, 04; антипрокидыватель тип 01, 02; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045, серый глянец, производитель Jinhu Color Powder CO.LTD – подножка тип 01, 02, 03, 04
	Сталь листовая углеродистая 08 ПС, ГОСТ 16523, производитель ПАО «Северсталь», РФ – металлическая пряжка ремня безопасности тип 02; набор инструментов; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 9005 Classic, черный глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», РФ – антипрокидыватель тип 01, 02, 03, 04, 05
	Ткань Oxford, HR6A3, 100% PIBX, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – сиденье; спинка тип 02, 03, 05, 06, 08, 09; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Ткань полиэфирная 100 % «DIONYSUS», ТУ 13.20.31-053-50899365-2020, черная, производитель ООО «БТК Текстиль», РФ – сиденье; спинка тип 02, 03, 05, 06, 08, 09; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Кожзаменитель марки Ecotar, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. КНР – подголовник тип 03
	Винилискожа мебельная ВИК-ТР «Эврика» по ТУ 13.96.14-025-0030030-2018, АО «Искож», РФ – подголовник тип 01
	Стропа Veritas S-580, полипропилен 100 %, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	Стропа EkoFlex, полипропилен 100 %, черная, ГОСТ 3487, производитель ООО «ПК Ультратекс», РФ – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited, КНР – боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; опора для стоп; фиксатор подголовника; насос
	Полипропилен Бален PP H030 GP/3, ТУ 2211-074-05766563-2015, производитель ПАО «Уфаоргсинтез», РФ – боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; опора для стоп; фиксатор подголовника

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

42

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 7

5. Кресло - коляска с ручным приводом складное облегченное Ortonica Trend 1000	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd., КНР – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 04; боковая поддержка; рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	Полиуретан Эпалан 60А, ГОСТ 24621, производитель ООО «РТ- Эпафлекс», РФ – накладка подлокотника тип 01, 02; опора для голени; подголовник тип 02; боковая поддержка
	Термоэластопласт Masflex 60109, ГОСТ Р 53533, производитель ООО «Руспласт», РФ - рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	ЛДСП, цвет «Белый фон», ГОСТ 32289, производитель ООО «Дятково-ДОЗ», РФ - столешница
	Термопластичный полиуретан (ТПУ) марки BT 65 и нейлон, производитель Xiamen Senyang Co., Ltd., China - подушка для сиденья тип 05 (Подушка противопролежневые с надувными ячейками Ortonica Easy Pad E80, РУ №РЗН 2018/6844)
	Алюминиевый сплав марки АДЗ1, ГОСТ 4784, производитель ООО «АВА-ТРЕЙД», РФ - приводной обод заднего колеса тип 02; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045 HR, серый глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок» – рама тип 02, 04; подножка тип 01, 02, 03, 04.
	Алюминий марки 6063T5, производитель Henan Yuanlong Aluminium Co. Ltd. КНР - приводной обод заднего колеса тип 02, 05; антипрокидыватель тип 01, 02; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 7045, серый глянец, производитель Jinhu Color Powder CO.LTD - подножка тип 01, 02, 03, 04
	Сталь листовая углеродистая 08 ПС, ГОСТ 16523, производитель ПАО «Северсталь», РФ - металлическая пряжка ремня безопасности тип 02; набор инструментов; с порошковым окрашиванием полиэфирной краской, RAL 9005 Classic, черный глянец, ГОСТ Р 59953, производитель ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», РФ – антипрокидыватель тип 01, 02, 03, 04, 05
	Ткань Oxford, HR6A3, 100% ПВХ, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – сиденье; спинка тип 01, 04, 07; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01 ,02, 03, 04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Ткань полиэфирная 100 % «DIONYSUS», ТУ13.20.31-053-50899365-2020, черная, производитель ООО «БТК Текстиль», РФ – сиденье; спинка тип 01, 04, 07; абдуктор; подушка для спинки тип 01, 02; подушка для сиденья тип 01, 02, 03 ,04; поясничный валик; подставка-подушка для ног; рюкзак
	Кожзаменитель марки Ecotar, производитель Wenzhou Simple Trading Co., Ltd. КНР – подголовник тип 03
	Винилскожа мебельная ВИК-ТР «Эврика» по ТУ 13.96.14-025-0030030-2018, АО «Искож», РФ – подголовник тип 01
	Стропа Veritas S-580, полипропилен 100 %, черная, производитель Shanghai Shun Yuan Xiang Textile Pty. Ltd., КНР – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	Стропа Ekoflex, полипропилен 100 %, черная, ГОСТ 3487, производитель ООО «ПК Ультратекс», РФ – ремень безопасности тип 01, 02, 03, 04; ремень натяжения обшивки; ремень под пятку; ремень для фиксации голени; ремень для фиксации стоп; фиксатор стопы; абдуктор; поясничный валик
	ABS пластик марки YU- 012, производитель Dongguan Cheng Zhi Plastic Material Limited, КНР - боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; рукоятка тормоза для сопровождающего лица; опора для стоп; фиксатор подголовника; насос
	Полипропилен Бален PP H030 GP/3, ТУ 2211-074-05766563-2015, производитель ПАО «Уфаоргсинтез», РФ – боковые щитки; пластиковая пряжка ремня безопасности тип 01; фастекс; ручка стояночного тормоза; опора для стоп; фиксатор подголовника
	Полиуретан марки PU3033, производитель Yantai Sanjiang Chemical Industry Material Co., Ltd., КНР – накладка подлокотника тип 03, 04; опора для голени; подголовник тип 04; боковая поддержка; рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

43

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 7

	Полиуретан Эпалан 60А, ГОСТ 24621, производитель ООО «РТ- Эпафлекс», РФ – накладка подлокотника тип 03, 04; опора для голени; подголовник тип 02; боковая поддержка
	Термоэластопласт Masflex 60109, ГОСТ Р 53533, производитель ООО «Руспласт», РФ - рукоятка ручки для сопровождающего лица цилиндрическая, анатомическая
	ЛДСП, цвет «Белый фон», ГОСТ 32289, производитель ООО «Дятково-ДОЗ», РФ - столешница
	Термопластичный полиуретан (ТПУ) марки ВТ 65 и нейлон, производитель Xiamen Senyang Co., Ltd., China - подушка для сиденья тип 05 (Подушка противопролежневые с надувными ячейками Ortonica Easy Pad E80, РУ №РЗН 2018/6844)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инн	дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
66445146.942815.40.000.00.00РЭ					Лист
					44

10. ПОДГОТОВКА КРЕСЛА - КОЛЯСКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




Перед началом эксплуатации извлеките части кресла - коляски из упаковки и внимательно осмотрите на отсутствие механических повреждений.

Убедитесь, что Ваше кресло - коляска укомплектовано, согласно разделу 8. Затем осуществите монтаж и необходимые регулировки.

Для регулировок используйте набор инструментов, который входит в комплектацию кресла - коляски.

10.1 Монтаж кресла – коляски представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Монтаж кресла – коляски

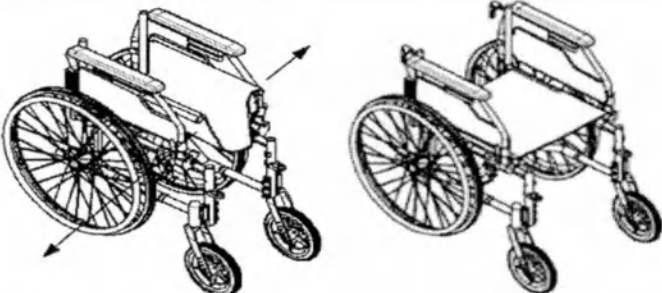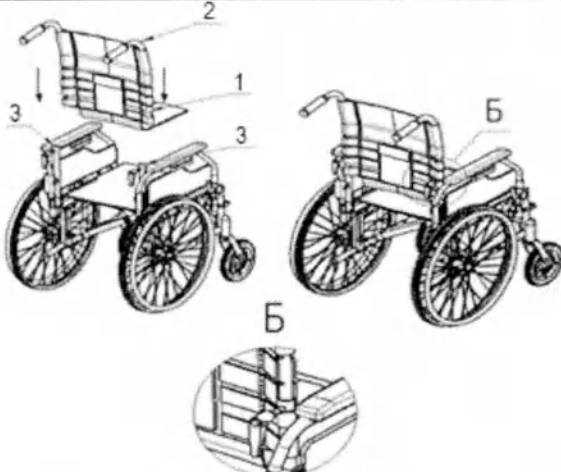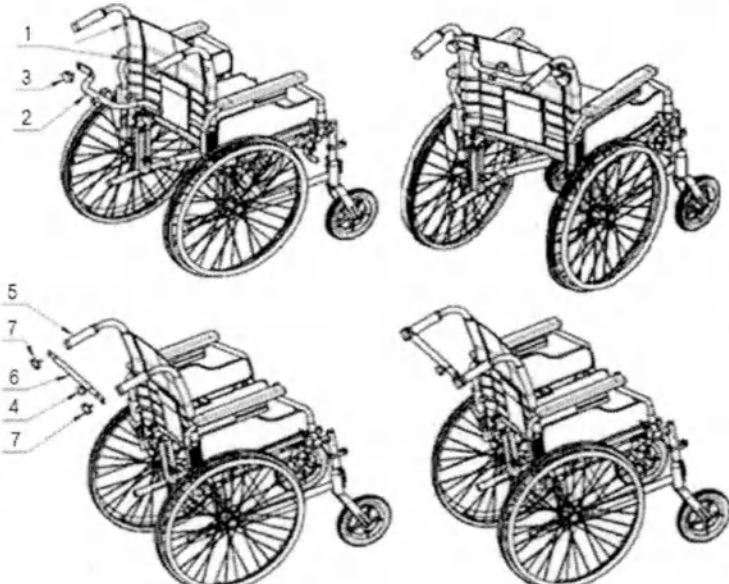Монтаж кресла - коляски	
1. Раскладывание кресла - коляски Разведите крестовину в стороны до полного контакта с полурамой. При контакте крестовины с полурамой произойдет натяжение сидения.	
2. Установка спинки с ручками для сопровождающего лица Ослабьте фиксирующие винты на спинке (вид Б). Ослабьте ремни натяжения обшивки (1) (для спинок типа 04 – 06) Вставьте ручки спинки (2) в основание спинки (3), закрепленное на полураме. Затяните фиксирующие винты.	
3. Установка распорки для жесткости (при наличии) 3.1 Установка распорки типа 01 (на спинку). Ослабьте регулировочные винты на спинке (1). Установите распорку (2) на фиксирующие винты (3). Фиксирующие винты должны совпасть с пазами распорки. Затяните фиксирующие винты на спинке. 3.2 Установка распорки типа 02 (на ручки для сопровождающего лица). Ослабьте регулировочный центральный винт распорки (4). Установите фиксирующие винты на ручки (5). Установите распорку (6) на фиксирующие винты (7). Винты должны совпасть с пазами распорки. Затяните фиксирующие винты на ручках и регулировочный винт распорки.	

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

45

Изм. Лист № докум. Подп. Дата


Продолжение таблицы 8

4. Установка подножки

Вставьте ось (1) подножки в полураму, клипса подножки (2) должна быть прижата к трубе полурамы.

Переведите подножку в рабочее положение до щелчка.

Откиньте опоры для стоп (3).

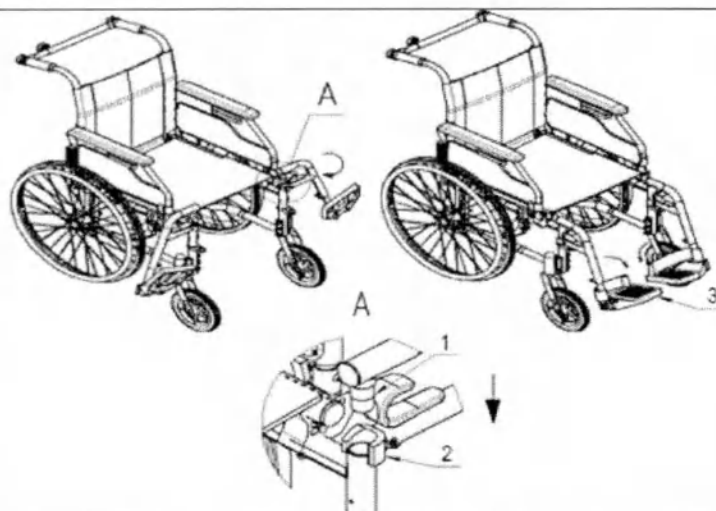

5. Установка антипрокидывателя

5.1 Установка антипрокидывателей типа 01 (без кнопочного фиксатора)

Установите антипрокидыватель в трубу полурамы (1) и

зафиксируйте винтами из монтажного комплекта с помощью инструмента.


5.2 Установка антипрокидывателей типа 02 – 05 (с кнопочным фиксатором)

Нажмите и удерживайте кнопочный фиксатор (2) антипрокидывателя.

Заведите конец антипрокидывателя в трубу полурамы, проталкивая антипрокидыватель вглубь полурамы.

Отпустите кнопочный фиксатор.

Установите антипрокидыватель до упора и поверните до характерного щелчка.

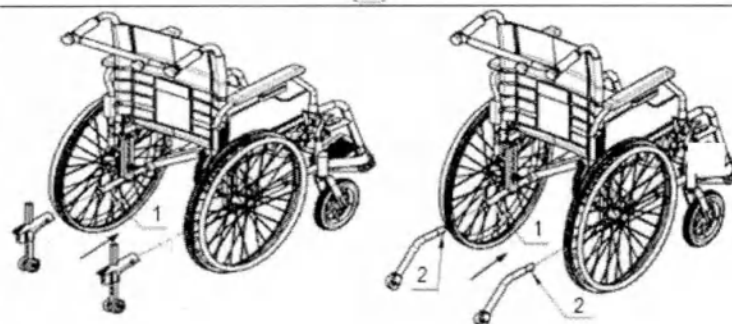

6. Установка подголовника (при наличии)

6.1 Установка подголовника типа 01 - 02.

Ослабьте регулировочный винт (1) кронштейна подголовника.

Установите подголовник (2), зафиксируйте регулировочным винтом.


6.2 Установка подголовника типа 03, 04

Ослабьте боковые регулировочные винты (3) на кронштейне распорки (4).

Установите кронштейн распорки на ручки и зафиксируйте боковыми регулировочными винтами.

Ослабьте центральный регулировочный винт (5).

Установите подголовник, зафиксируйте центральным регулировочным винтом.

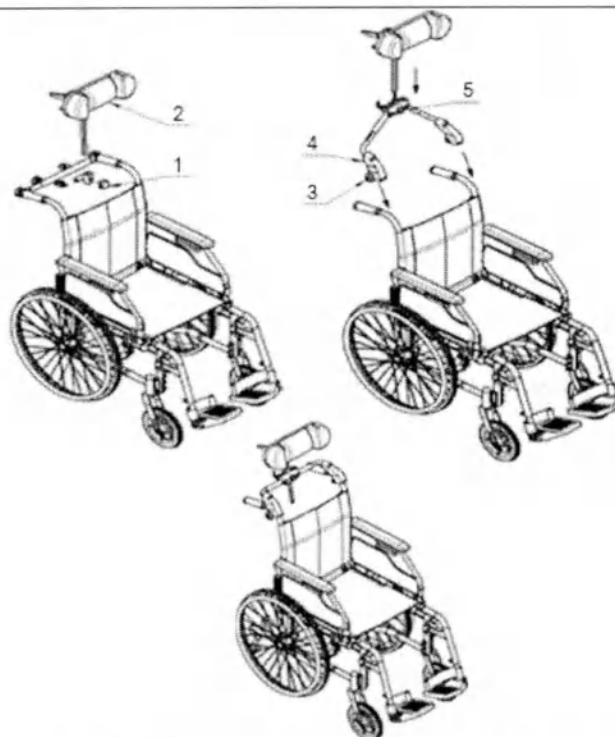

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

46


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 8


7. Установка боковой поддержки (при наличии)
Выкрутите винты держателя (1).
Разместите держатель (2) на спинке на требуемой высоте.
Установите в держатель боковые поддержки (3) и затяните винты при помощи инструмента.

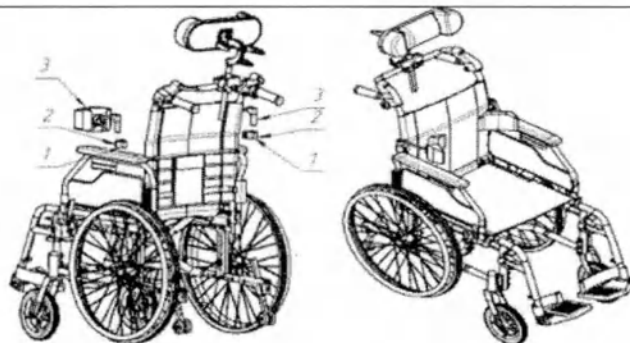

8. Установка абдуктора (при наличии)
Заведите концы абдуктора под сиденье и скрепите контактной лентой (Velcro).
Дальнейшая установка осуществляется в полностью смонтированном и отрегулированном кресле – коляске после посадки пользователя.
Если Вам требуется латеральный абдуктор (1) (сведение бедер для стабилизации посадки), оберните ремни абдуктора вокруг бедер снаружи, а ремни фиксации вокруг подлокотников (2) и закрепите пластиковой пряжкой.
Если Вам требуется медиальный абдуктор (3) (разведение бедер для стабилизации посадки), оберните ремни абдуктора вокруг бедер изнутри, а ремни фиксации вокруг подлокотников (2) и закрепите пластиковой пряжкой.

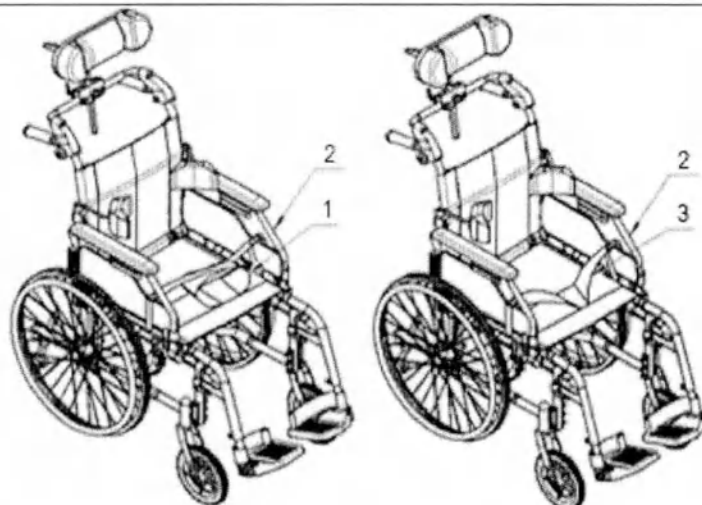

9. Установка задних приводных колес (при необходимости)
9.1 Установка колес типа 01, 02, 04, 05.
Нажмите и удерживайте кнопку (1) быстросъемной оси колеса и вставьте во втулку колеса (2). Отпустите кнопку быстросъемной оси.
9.2 Установка колес типа 03.
Произведите подготовку оси механизма управления одной рукой (3): сожмите пружинный механизм оси и зафиксируйте регулировочным винтом (4), установите ось механизма управления одной рукой в ось одного из колес.
Отпустите регулировочный винт и направьте ось механизма управления одной рукой в ось противоположного колеса. Затяните регулировочный винт.
Установите ось колеса в ось механизма управления одной рукой через втулку кронштейна (5) держателя заднего колеса. Отпустите кнопку для защелкивания фиксатора.

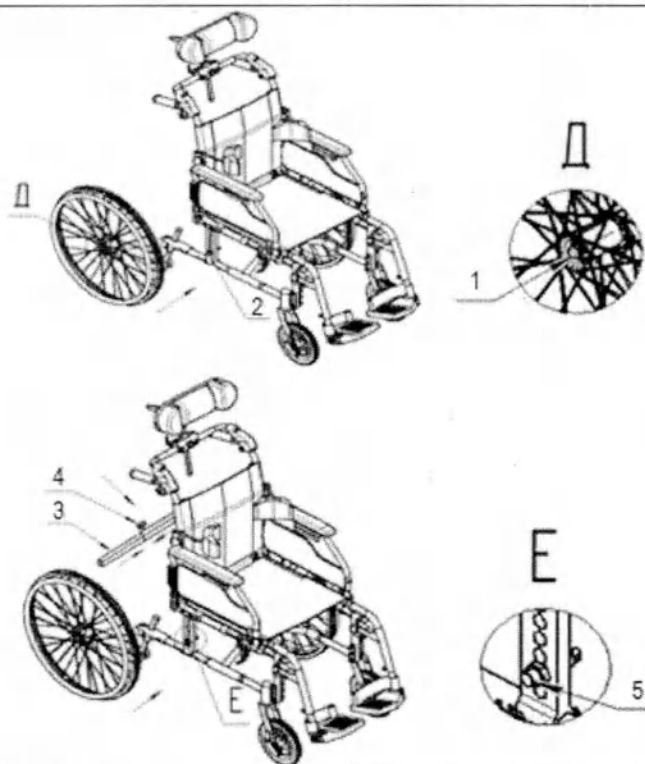

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

47


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 8


10. Установка транзитных колес (при наличии и необходимости проезда в узкие дверные и лифтовые проемы)
 Перед установкой транзитных колес (1) необходимо снять задние приводные колеса (2). Для этого нажмите и удерживайте кнопку (3) быстросъемной оси и потяните колесо на себя.
 Снимите ось механизма управления одной рукой (4) (для колес типа 03).
 В целях предотвращения заваливания кресла-коляски эту операцию необходимо выполнять вдвоем.
 Разместите транзитное колесо снизу полурамы, зафиксируйте с использованием монтажного комплекта при помощи инструмента.
 Если Вам необходимо снять транзитные колеса, открутите винты кронштейнов при помощи инструмента и снимите колеса с рамы.

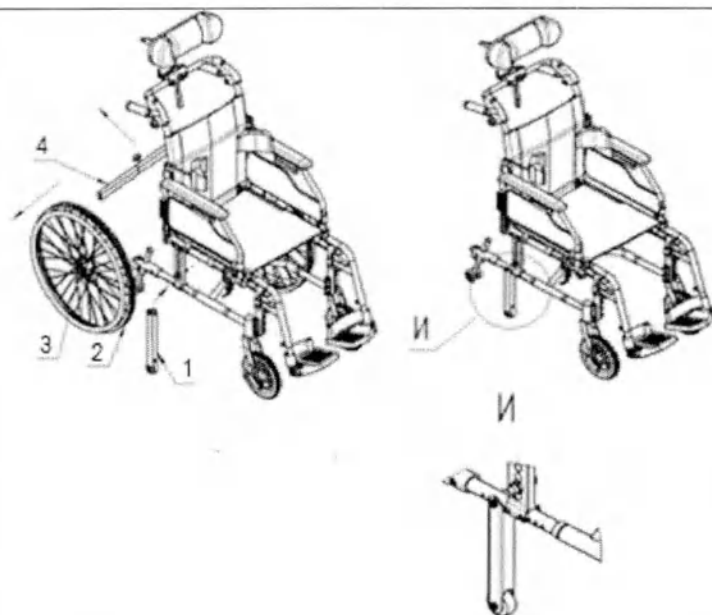

11. Установка подушки для спинки (при наличии)
 11.1 Установка подушки типа 01
 Установите подушку (1), завернув край (2) за спинку, закрепите контактной лентой (Velcro).
 11.2 Установка подушки тип 02
 Установите подушку (1), завернув края (2) за спинку, закрепите контактной лентой (Velcro).

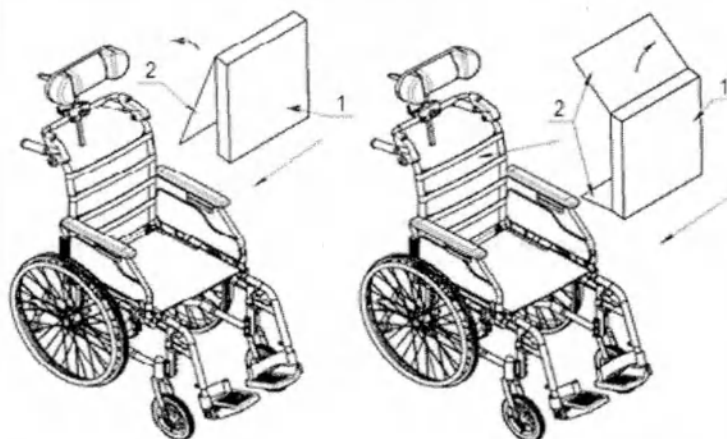

12. Установка подушки для сиденья (при наличии)
 12.1 Установка подушки типа 01, 02, 03, 04
 Установите подушку (1) противоскользящей стороной к сиденью.
 12.2 Установка подушки типа 05
 Надуйте подушку.
 Утопите клапан вглубь подушки.
 Установите подушку на сиденье клапаном вниз.

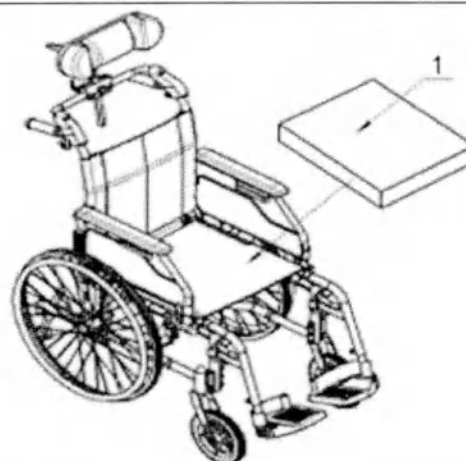

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

48


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 8


13. Установка жесткого основания для сиденья (при наличии)
 Расстегните молнию на подушке для сиденья (1). Вставьте жесткое основание (2) со стороны, соприкасающейся с сиденьем. Застегните молнию

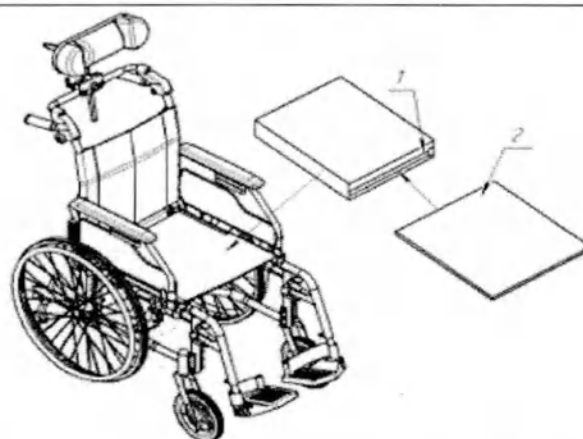


14. Установка жесткого основания для спинки (при наличии)
 Установите жесткое основание (1) в боковой разрез подушки (2) для спинки. Расправьте внутренний клапан, разместите в нем край жесткого основания.

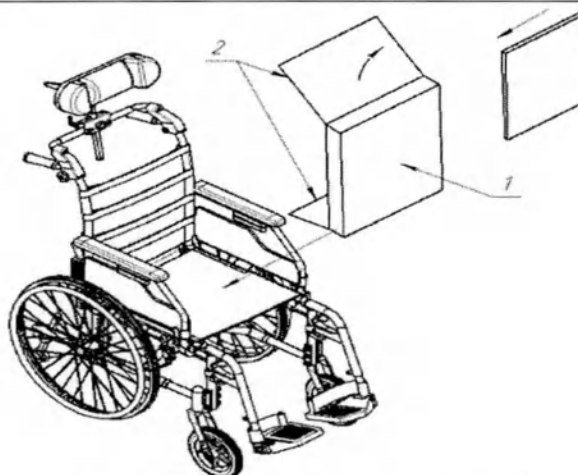

15. Установка ремня для фиксации голени (при наличии)
 Разъедините контактную ленту ремня. Оберните ремень (1) вокруг труб подножек (2), закрепите контактную ленту (Velcro).

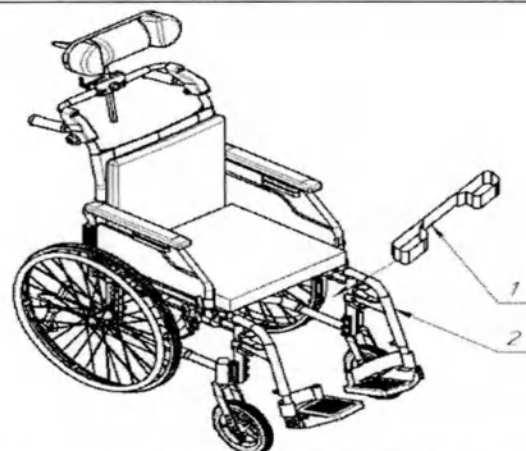

16. Установка ремня для фиксации стоп (при наличии)
 Разъедините пластиковую пряжку ремня. Оберните ремень (1) вокруг подножек (2), зафиксировав ноги пользователя, и защелкните пряжку.

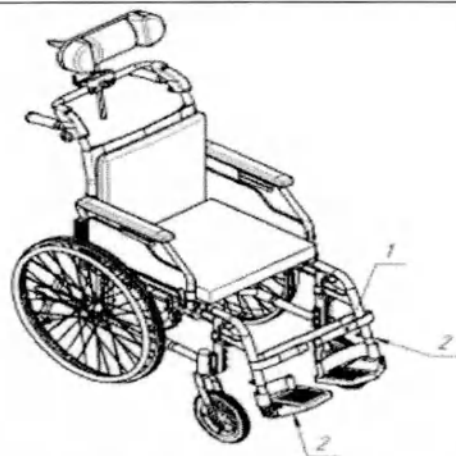

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

49

Изм. Лист № докум. Подп. Дата


Продолжение таблицы 8

17. Установка фиксаторов стоп (при наличии)

Выкрутите винты (1) при помощи инструмента с нижней части опор стоп подножек (2).

В освобожденный держатель (3) установите фиксатор стопы.




Закрутите винт обратно.

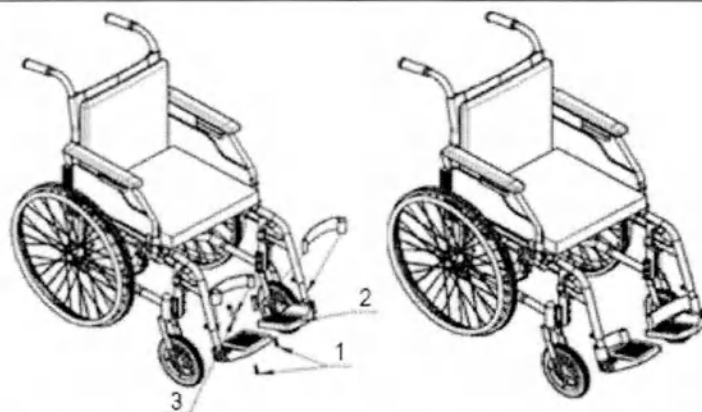

18. Установка столика (при наличии)

Раскрутите винты (1), удерживающие платформы регулировки высоты подлокотников (2), с помощью инструмента. Снимите нижние платформы, установите на их место кронштейны столика (3). Установите нижние платформы снизу кронштейнов столика (4) и винты обратно с помощью инструмента.

Установите столешницу (5) на кронштейны и зафиксируйте при помощи винтов.

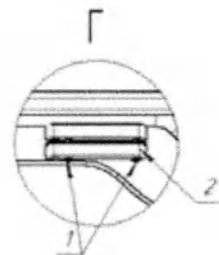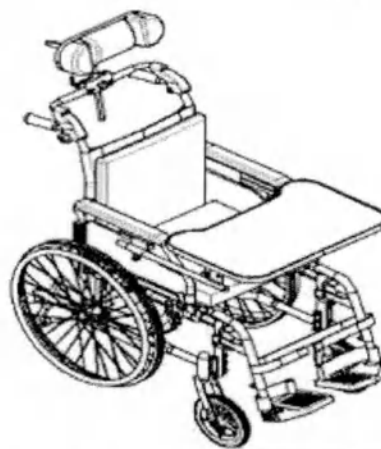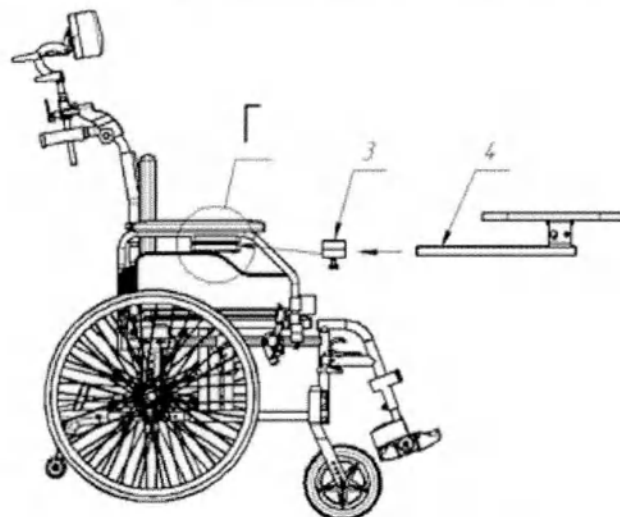


19. Установка защитного колпака на спицы

(при наличии)
Снимите задние приводные колеса (1) как указано в п.10 таблицы 8.

Ослабьте винты клипс (2) колпака (3). Зафиксируйте клипсы на спицах (4), затянув винты.

Установите задние приводные колеса (1) как указано в п.9 таблицы 8.

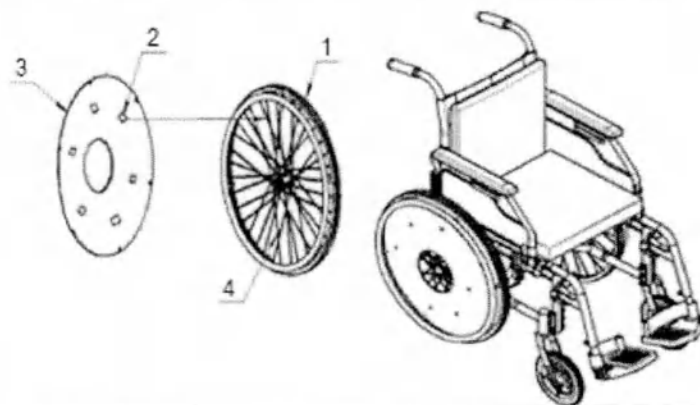

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

50


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 8


20. Установка поясничного валика (при наличии)
Разъедините контактную ленту поясничного валика (1), оберните ремень вокруг спинки. Закрепите контактную ленту.

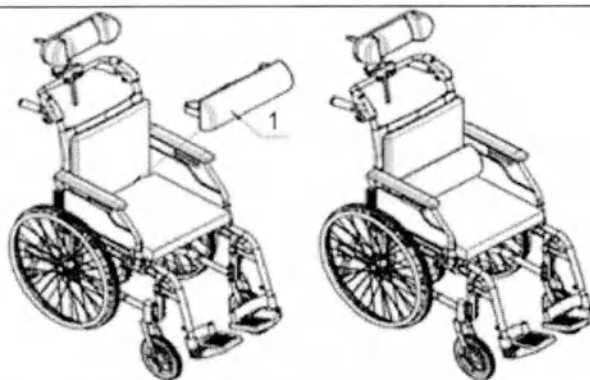


21. Установка тростедержателя (при наличии)
Установите тростедержатель (1) на нижнюю трубу (2) полурамы и зафиксируйте с использованием монтажного комплекта (3) при помощи инструмента.

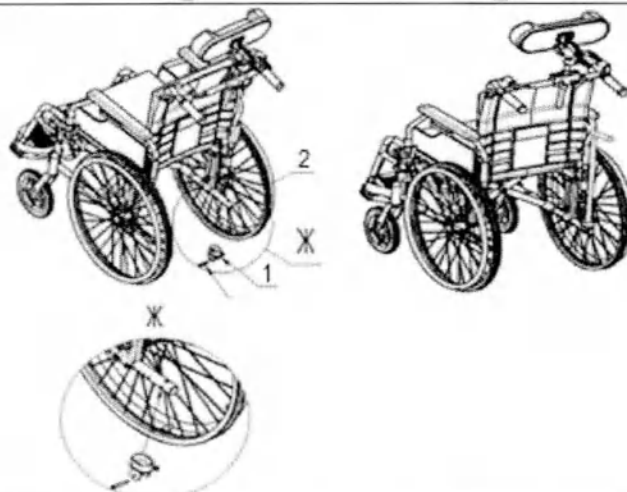

22. Установка силиконового чехла на обод заднего колеса (при наличии)
Расширьте паз силиконового чехла (1). Равномерно распределите силиконовый чехол на ободе заднего колеса (2).

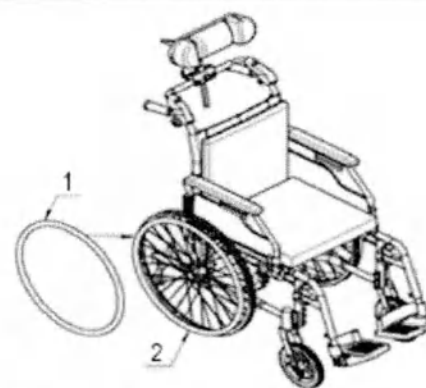

23. Установка рюкзака (при наличии)
Разместите рюкзак (1) на спинке кресла – коляски, надев лямки на ручки для сопровождающего лица. Так же рюкзак подходит для обычного использования - переноски на спине различных грузов.

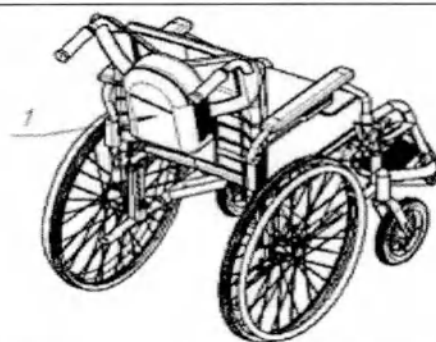


66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

51

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

24. Установка подставки - подушки для ног (при наличии и необходимости регулировки высоты расположения ног на подножке)
Разъедините пластиковые пряжки. Установите требуемое количество секций подставки - подушки (одну или две). Установите подставку - подушку противоскользящей стороной к подножкам. Защелкните пластиковые пряжки. Разъедините контактную ленту (Velcro) на верхней секции подставки - подушки. Расположите ноги пользователя на верхней секции подставки - подушки и закрепите контактной лентой.

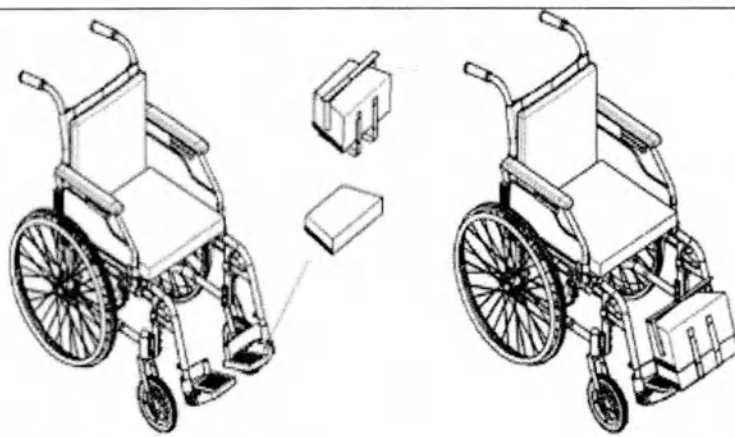


10.2 Регулировки кресла - коляски представлены в таблице 9.


Таблица 9 – Регулировки кресла - коляски

Регулировки кресла - коляски

1 Сиденье, регулировка по глубине
Выкрутите винты (1) узла (2), определяющего глубину сиденья. Разъедините контактную ленту (Velcro), скрепляющую спинку (3) и сиденье (4). Установите сиденье на необходимую глубину и закрутите винты назад.
Выкрутите стопорные винты (5), удерживающие телескопические трубки (6) для изменения глубины сиденья. Разъедините контактную ленту, скрепляющую сиденье и его подвижную часть. Отрегулируйте телескопическими трубками глубину сиденья. Закрутите стопорные винты назад. Соедините контактной лентой сиденье, его подвижную часть и спинку.
При регулировке сиденья кресла - коляски при необходимости отрегулируйте положение подлокотника. Для этого переместите механизм фиксации подлокотника (7), окрутив гайку, удерживающую его, и переставьте подлокотник в рабочее положение. Закрутите гайку.

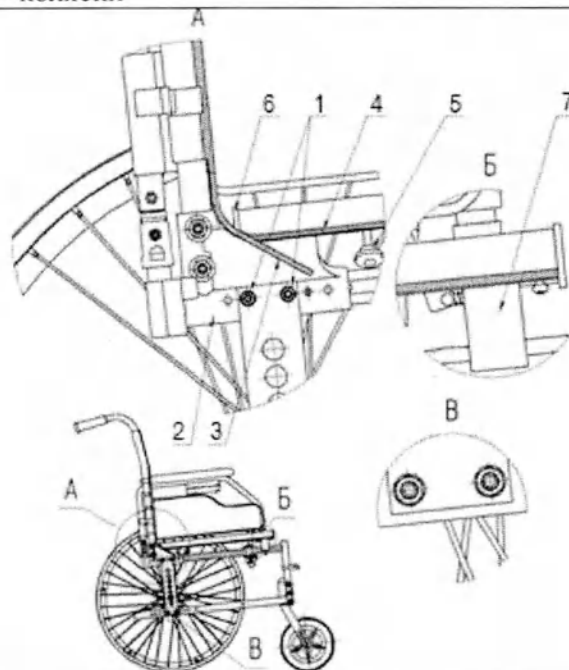

2 Сиденье, регулировка по углу наклона и высоте
Регулировка угла наклона производится путем изменения высоты передних и задних колес. Регулировка высоты сиденья производится так же путем изменения высоты передних и задних колес.
Чтобы изменить высоту задних колес (при необходимости), снимите их, как указано в п.10 таблицы 8. Открутите гайку (1) с помощью инструмента и освободите втулку заднего колеса (2). Переставьте втулку заднего колеса в требуемое положение, закрутите гайку. Установите задние колеса как указано в п.9 таблицы 8.
Чтобы изменить высоту передних колес (при необходимости), раскрутите гайки (3) и освободите винты (4). Переставьте переднее колесо в требуемое положение. Установите винты и закрутите гайки.

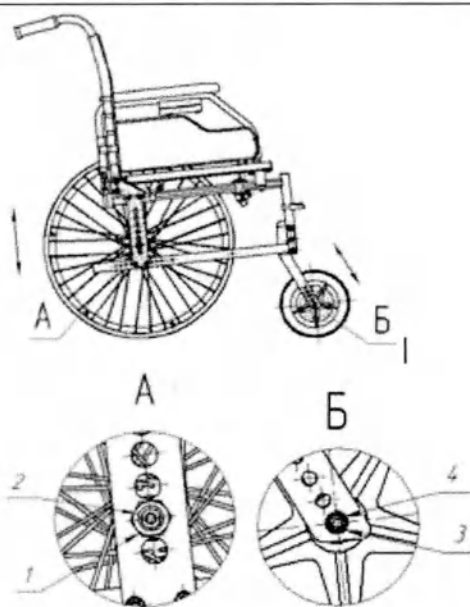

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

52

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 9



3 Подлокотник, регулировка по высоте

3.1 Регулировка подлокотников типа 02, 04 (с кнопочным фиксатором)


Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора (1), затем установите подлокотник на нужную высоту и отпустите кнопку. Для полной фиксации надавите рукой сверху на подлокотник до срабатывания механизма фиксации (характерный щелчок).

3.2 Регулировка подлокотников типа 01, 03 (без кнопочного фиксатора)


Выкрутите винт (2), удерживающий платформы регулировки высоты подлокотника (3), с помощью инструмента. Преподнимите подлокотную опору (4) и поместите под нее требуемое количество платформ. Закрутите винт обратно.

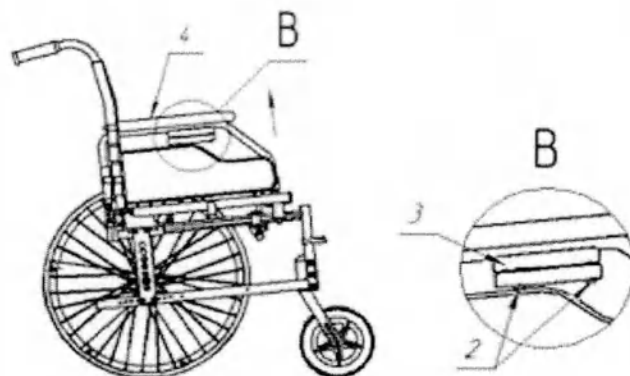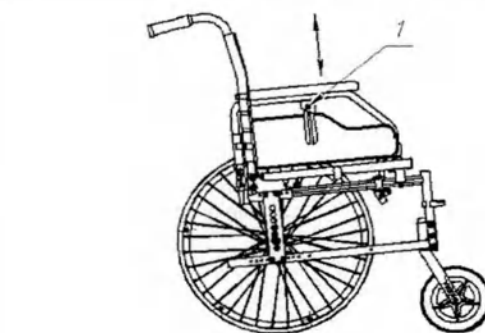

4 Переднее колесо, регулировка по высоте
Раскрутите гайки (1) и освободите винты (2). Переставьте переднее колесо в требуемое положение. Установите винты и закрутите гайки.

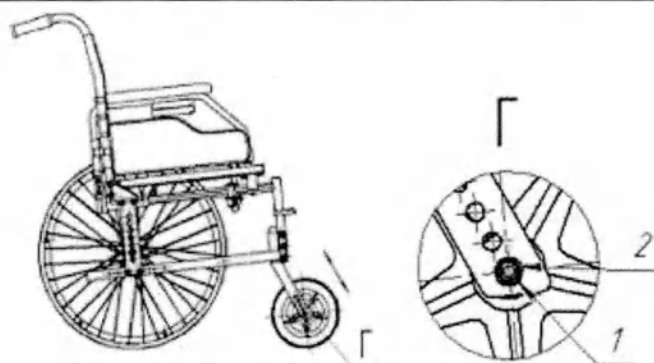

5 Переднее колесо, регулировка по углу наклона.
Раскрутите болты (1) кронштейнов переднего колеса (2). Извлеките гайки со смещенным центром (3) из кронштейна переднего колеса. Установите гайки, развернув их на 180 градусов, закрутите болты.

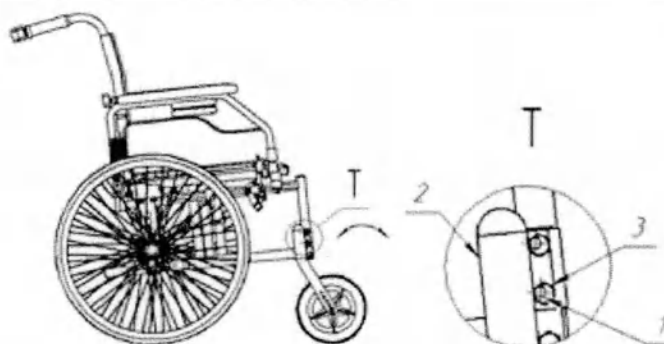

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

53

Изм. Лист № докум. Подп. Дата


Продолжение таблицы 9

6 Заднее приводное колесо, регулировка по вертикали

Снимите задние приводные колеса как указано в п.10 таблицы 8. Открутите гайку (1) с помощью инструмента и освободите втулку заднего колеса (2). Переставьте втулку заднего колеса в требуемое положение. Закрутите гайку. 8.

Установите заднее колесо обратно как указано в п.9 таблицы 8.

Для корректной работы стояночного тормоза, отрегулируйте его по горизонтали, как указано в п. 8 таблицы 9.

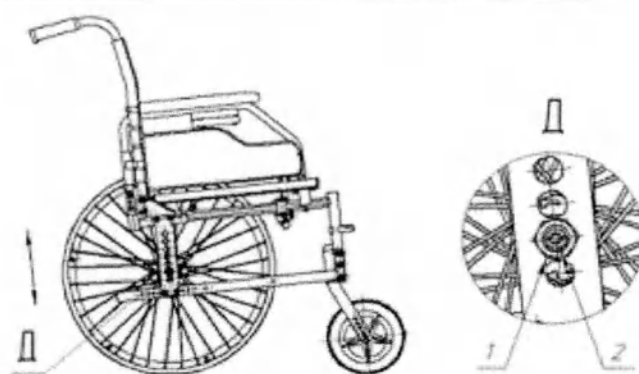


7 Заднее приводное колесо, регулировка по горизонтали

Снимите задние приводные колеса как указано в п.10 таблицы 8.

Открутите гайки (1) с помощью инструмента. и извлеките винты (2) кронштейна колеса (3). Переставьте кронштейн колеса в требуемое положение. Установите винты обратно и закрутите гайки.


Установите заднее колесо обратно как указано в п.9 таблицы 8.

Для корректной работы стояночного тормоза, отрегулируйте его по горизонтали, как указано в п. 8 таблицы 9.

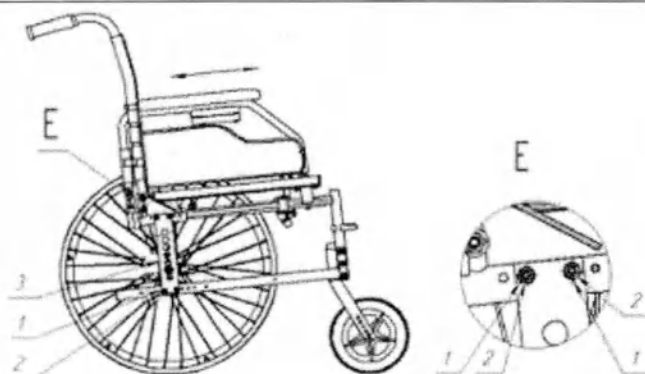

8 Стояночный тормоз, регулировка по горизонтали

Для перемещения стояночного тормоза выкрутите винты (1), переставьте тормоз в рабочее положение. Закрутите винты.

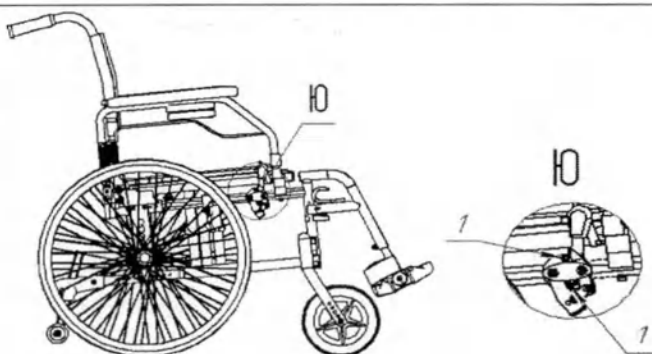

9 Спинка с ручками для сопровождающего лица, регулировка по высоте

Разъедините контактную ленту (Velcro), скрепляющую спинку (1) и сиденье (2).


Разъедините контактную ленту, скрепляющую ремни натяжения обшивки спинки (3) (для спинок типа 04 – 06).

Ослабьте регулировочные винты (4) на спинке.

Отрегулируйте высоту спинки.

Затяните регулировочные винты.

Соедините контактную ленту, скрепляющую ремни натяжения обшивки спинки (для спинок типа 04 – 06).

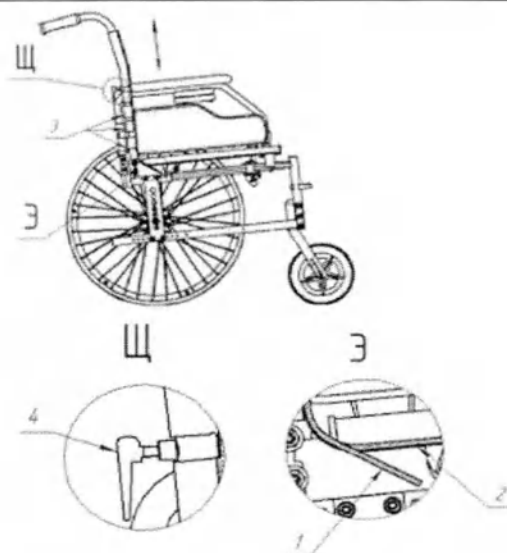

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

54


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 9

10 Спинка с ручками для сопровождающего лица, регулировка по углу наклона рычагами (для спинок типа 03, 06, 09).

Сжимая и удерживая рычаги на ручках для сопровождающего лица (1), установите спинку в требуемое положение.


Отпустите рычаги на ручках.

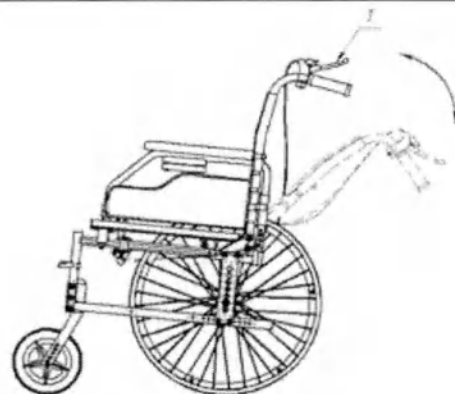

11 Спинка с ручками для сопровождающего лица, регулировка по углу наклона ремненным механизмом (для спинок типа 02, 05, 08).

Придерживая одной рукой спинку (1), потяните от себя петлю ремennого механизма (2) и установите спинку в требуемое положение.

Отпустите петлю ремennого механизма.

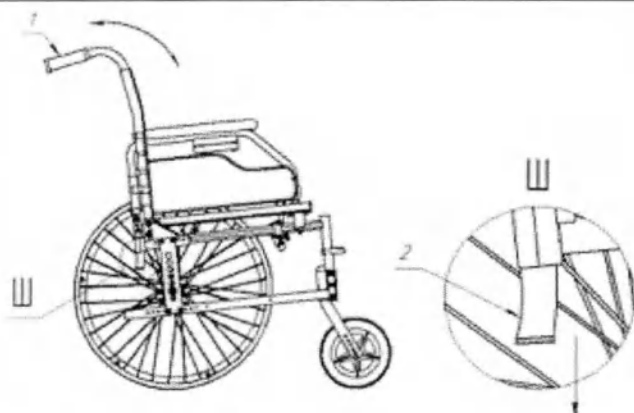

12 Подножка, регулировка по длине

12.1 Регулировка подножек типа 03 (с кнопочным фиксатором)


Нажмите и удерживайте кнопочный фиксатор.

Установите необходимую высоту подножки, переключив положения (2) кнопочного фиксатора.

12.2 Регулировка подножек типа 01, 02, 04 (без кнопочного фиксатора)


Выкрутите регулировочные винты (3) с помощью инструмента и установите необходимую высоту подножки.

Установите регулировочные винты обратно.

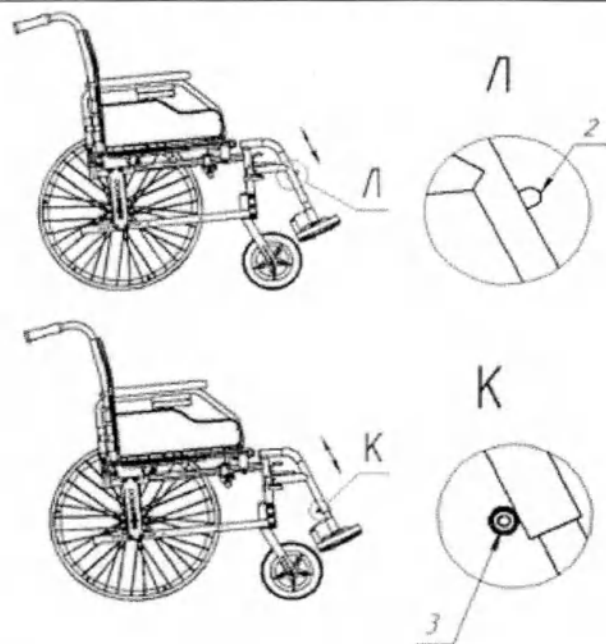

13 Подножка, регулировка по углу наклона (для подножек типа 04)

Нажмите на рычаг регулировки (1) и установите необходимый угол наклона подножки.

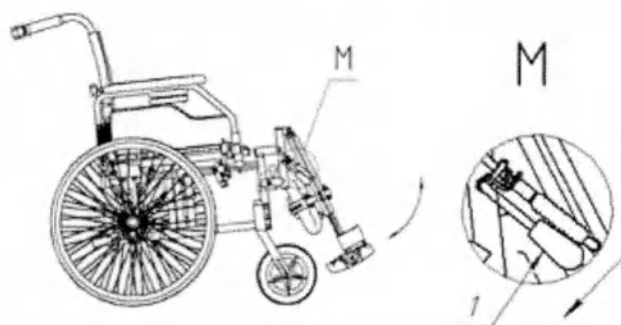

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

55

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 9

14 Опора для стопы подножки, регулировка по углу наклона
Выкрутите винт фиксации положения опоры стопы (1). Извлеките опору для стопы (2) и, развернув на требуемый угол, установите обратно. Закрутите винт фиксации.

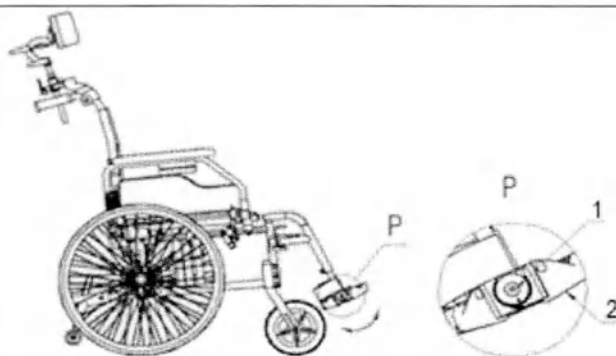


15 Подголовник, регулировка по высоте
Ослабьте регулировочный винт (1) и установите подголовник (2) на требуемую высоту. Зафиксируйте выбранное положение регулировочным винтом.




16 Подголовник, регулировка по углу наклона
Ослабляйте последовательно регулировочные винты (1), устанавливая требуемый угол подголовника (2). Зафиксируйте выбранное положение регулировочными винтами.



17 Подголовник, регулировка по охвату головы (для подголовников типа 01, 03)
Надавите руками на боковые части подголовника (1) и установите требуемое положение.

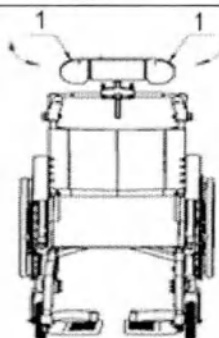

18 Боковая поддержка, регулировка по высоте
Ослабьте регулировочные винты (1) и установите требуемое положение, смещая боковую поддержку вдоль трубы спинки. Закрутите регулировочные винты.

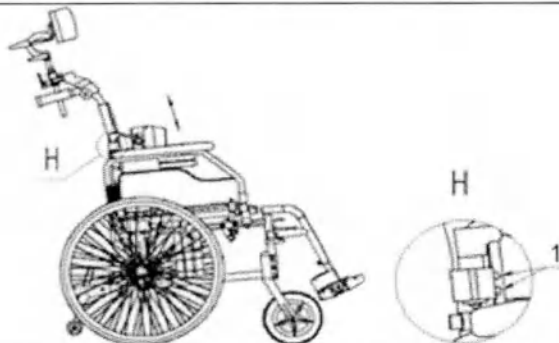

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

56


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 9

19 Боковая поддержка, регулировка по ширине
Ослабьте регулировочные винты (1) и установите требуемую ширину, разворачивая боковые поддержки относительно друг друга. Закрутите регулировочные винты.

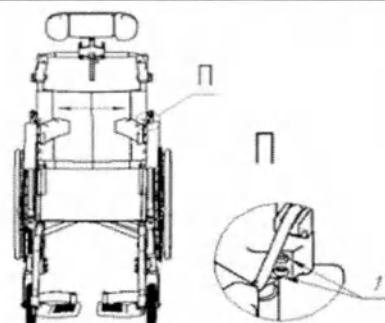

20 Боковая поддержка, регулировка по углу наклона
Регулировка производится самоцентрирующимся шаровым шарниром (1).

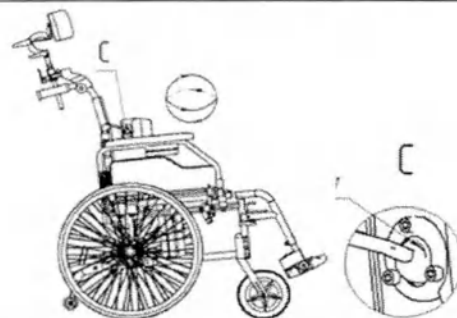


21 Антипрокидыватель, регулировка по высоте
21. 1 Регулировка антипрокидывателей типа 02, 05 (с кнопчным фиксатором)

Нажмите кнопочный фиксатор (1) и удерживайте его.

Установите необходимую высоту ножки антипрокидывателя (2), переключив положения кнопочного фиксатора.


21. 1 Регулировка антипрокидывателей типа 01 (без кнопочного фиксатора)

Отожмите регулировочную шайбу (3) и, удерживая ее, установите необходимую высоту ножки антипрокидывателя (4).

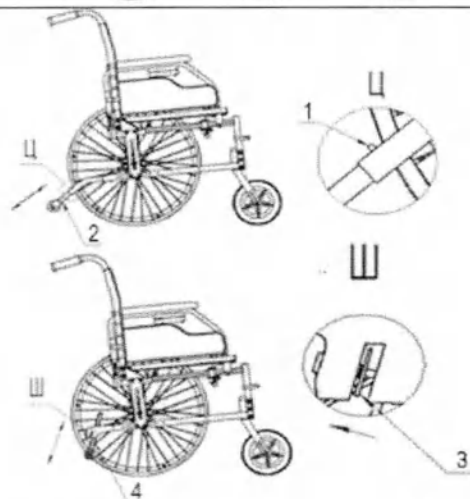

22 Антипрокидыватель, регулировка по длине (для антипрокидывателей типа 04, 05)

Нажмите кнопочный фиксатор и удерживайте его. Установите антипрокидыватель на необходимую длину (глубину), переключив положения кнопочного фиксатора.

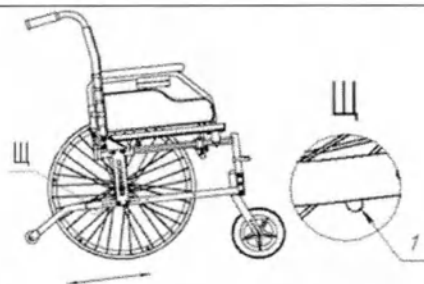

23 Регулировка давления в шинах (для пневматических колес)

Открутите с ниппеля колеса колпачок и установите насадку насоса на ниппель. При помощи манометра измеряйте давление в шинах и подкачайте их насосом (при необходимости). При эксплуатации давление должно составлять 0,25 мПа. Снимите насадку насоса с ниппеля и закрутите колпачок обратно.



66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

57

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЕСЛА – КОЛЯСКИ

11.1 Эксплуатация кресла - коляски должна производиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

11.2 Срок службы кресла - коляски при эксплуатации – 6 лет.

11.3 За предельное состояние принимается состояние кресла – коляски, при котором восстановление его работоспособности невозможно, либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового кресла - коляски).

11.7 Сопровождающее лицо может приводить кресло - коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

11.8 При самостоятельном передвижении на кресле - коляске необходимо использовать приводные ободы на задних колесах.

11.9 Для парковки необходимо использовать стояночный тормоз.

11.10 Меры предосторожности при эксплуатации кресла - коляски представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Меры предосторожности при эксплуатации

• Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла - коляски.

• Перед посадкой пользователя в кресло - коляску проверьте надежность закрепления спинки.



ОСТОРОЖНО!

Запрещается эксплуатация кресла – коляски с неисправными тормозами



ОПАСНО!

При посадке пользователя в кресло – коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза



ВНИМАНИЕ!

Сопровождающее лицо должно обладать физической и психической дееспособностью: приводить в движение кресло - коляска, управлять им и тормозить собственными силами



ИНФОРМАЦИЯ

Не превышайте грузоподъемность кресла – коляски

• Для посадки в кресло - коляску спереди необходимо:
– зафиксировать колеса с помощью стояночных тормозов;
– сложить вверх опоры для стоп;
– переместить пользователя в кресло - коляску;
– опустить вниз опоры для стоп и поставить на них ноги;
– пристегнуть ремень безопасности, вставив пряжку ремня в замок



66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

58

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 10

- Для посадки с боковой стороны:
 - поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
 - откинуть подлокотник со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;
 - сложить подножки вверх;
 - переместить пользователя в кресло - коляску;
 - установить подлокотники и подножки в исходное положение;
 - пристегнуть ремень безопасности.
- Высадка осуществляется в обратной последовательности.



ИНФОРМАЦИЯ

Стояночные тормоза не предназначены для торможения в движении!

- Для самостоятельной пересадки из кресла - коляски без посторонней помощи, Вы должны быть достаточно подвижны и обладать значительной мышечной силой.
- Расположите кресло - коляску, как можно ближе к месту, на которое Вы хотите пересесть, так, чтобы передние колеса смотрели прямо.
- Поставьте задние колеса на стояночные тормоза.
- Поднимите подлокотник, находящийся на той стороне, куда Вы планируете пересесть, наверх и откиньте подножки в стороны.
- Переместите тело в место, куда хотите пересесть, опершись на противоположный подлокотник.



ИНФОРМАЦИЯ

Не наступайте на подножку, во избежание поломки или опрокидывания кресла – коляски!



- Необходимо иметь в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела пациента или изменении нагрузки на кресло - коляску, а также наклоне на угол более 10° повышается опасность опрокидывания кресла - коляски.



66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

59

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

	ИНФОРМАЦИЯ Не тянитесь за чем-либо через спинку кресла - коляски – велик риск опрокинуть кресло - коляску!	
• Подкатите кресло - коляску как можно ближе к объекту так, чтобы можно было его взять, просто протянув руку, сохранив при этом нормальное сидячее положение.		
• Прежде чем в одиночку выполнить какое - либо незнакомое действие при использовании кресла - коляски, проделайте это под чьим-либо присмотром.		
• Для преодоления лестниц, оборудованных въездными пандусами, воспользуйтесь помощью сопровождающего лица		
• Лестницы, не оборудованные въездными пандусами или подъемниками, должны преодолеваются только с помощью двух помощников, один из которых встает впереди кресла - коляски, а другой сзади. Помощник, стоящий позади кресла - коляски, наклоняет ее до достижения равновесия, затем подвозит ее к первой ступеньке, крепко ухватив кресло - коляску за ручки. Вторым помощник, находящийся спереди кресла - коляски, крепко держит кресло - коляску за передние элементы рамы и приподнимает кресло - коляску по ступеням, в то время как первый помощник ставит ногу на следующую ступеньку, повторяя предыдущую операцию. Не опускайте передние колеса до тех пор, пока помощник, стоящий перед креслом - коляской, не преодолеет последнюю ступеньку. Чтобы спустить кресло - коляску с лестницы: повторите описанные выше операции в обратном порядке.		
• Не превышайте максимальный угол подъема – 6 °С. Более крутые подъемы и спуски создают риск опрокидывания кресла - коляски из-за проскальзывания колес или заноса.		

66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

60


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 10

- При подъемах наклоняйтесь вперед для предупреждения опрокидывания.

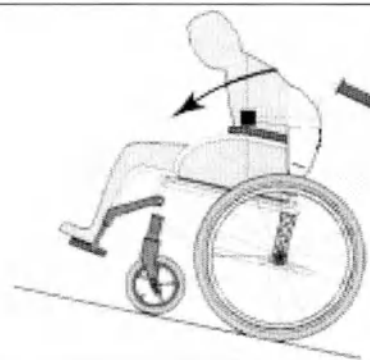

- Не пытайтесь пересекать наклонную поверхность по диагонали.

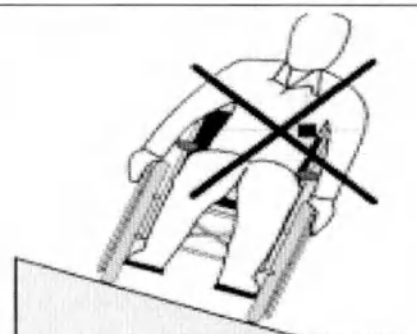

- При съезде по наклонной поверхности вперед, перенесите центр тяжести назад, наклонившись назад и плотно облокотившись на спинку. Позвольте приводному ободу заднего колеса скользить по Вашим ладоням, контролируя при этом скорость и направление движения кресла - коляски.




- Запрещается двигать кресло - коляску на препятствие (пороги, ступеньки, бордюры и др.) высотой, более указанной в паспорте изделия. Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы.



ОПАСНО!

При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из кресла - коляски вперед.

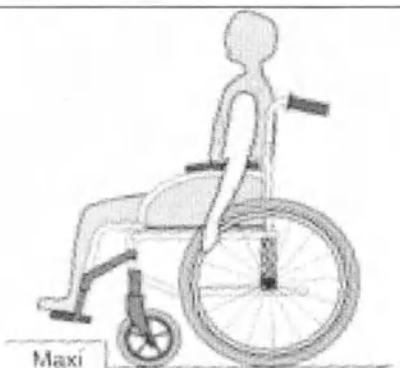

- Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.



66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

61

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 10

- При использовании регулируемого пешеходного перехода Вам необходимо:
 - подъехать к съезду с тротуара на проезжую часть, оборудованную пешеходным переходом;
 - поставить кресло - коляску на стояночный тормоз;
 - дождаться разрешающего сигнала светофора;
 - убедиться в отсутствии транспортных средств на пешеходном переходе, снять кресло - коляску со стояночного тормоза и осуществить спуск;
 - не задерживаться и не останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на островках безопасности;
 - при приближении к краю проезжей части совершите подъем.

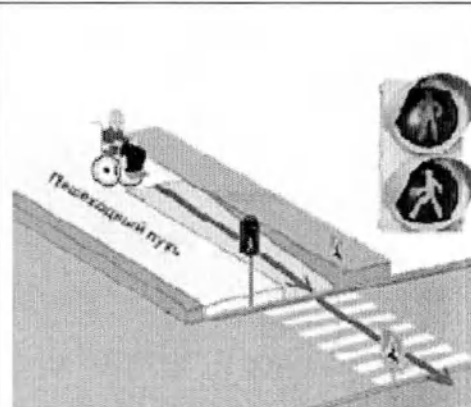

- Сопровождающее лицо должно:
 - проверить ходовые качества кресла - коляски;
 - проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках, а края одежды и покрывала не попадали в спицы колёс;
 - предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне кресла - коляски;
 - не разгонять кресло - коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;
 - не оставлять пользователя без присмотра, даже если кресло - коляска стоит на тормозе;
 - следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёмов и косяков;
 - ни при каких обстоятельствах не отпускать кресло - коляску при движении в гору или с неё;
 - ни в коем случае не наклонять кресло - коляску вперёд;
 - чтобы съехать с бордюра, развернуть кресло - коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;
 - при преодолении бордюра наклонить кресло - коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;
 - проводить регулярные осмотры кресла - коляски;
 - при движении по дорогам соблюдать правила дорожного движения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
62

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1 Кресло - коляска транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозок в транспортной упаковке завода - изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до +50 °С, относительной влажности до 100% (при температуре +25 °С) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

12.2 Транспортировка кресла - коляски без упаковки завода - изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения кресла - коляски, полученные в результате транспортировки без упаковки завода - изготовителя, устраняются потребителем.

12.3 Кресло - коляска, освобожденное от транспортной упаковки, должно храниться при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до +40 °С, относительной влажности до 98% (при температуре +25 °С) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

12.4 Для транспортирования кресло - коляски необходимо выполнить демонтаж составных частей, указанных в таблице 10.


Таблица 11 – Демонтаж кресла – коляски для транспортирования

Для того чтобы легко транспортировать кресло - коляску достаточно выполнить ряд простых ручных операций:

1 Снимите столик (при наличии), раскрутив фиксирующие винты кронштейнов столешницы



2 Снимите подушку для спинки (при наличии), разъединив контактную ленту

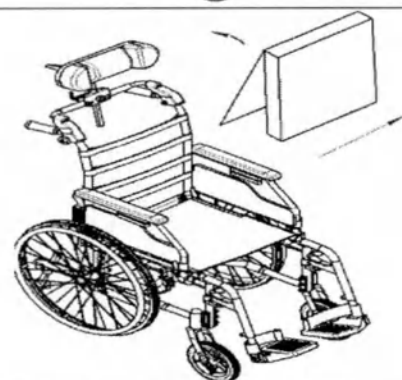

3 Снимите подголовник (1) в сборе с держателем (при наличии), открутив фиксирующие винты (2)



66445146.942815.40.000.00.00РЭ


Лист

63


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Окончание таблицы 11

4 Снимите распорку для жесткости (1) (при наличии), открутив фиксирующие винты (2)

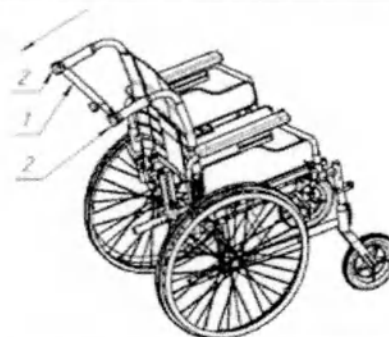

5 Снимите спинку (1) с ручками для сопровождающего лица и боковыми поддержками (при наличии), выполняя действия, указанные в п.2 таблицы 8 в обратном порядке (для спинок типа 01, 04, 07).

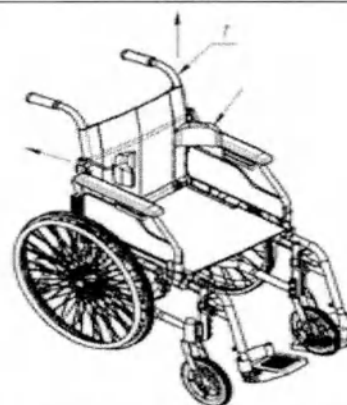


6 Сложите спинку с ручками для сопровождающего лица и опустите на сиденье (2) (для спинок типа 02, 03, 05, 06, 08, 09).



7 Разведите подножки (1) в стороны, снимите их с кресла - коляски движением вверх.



8 Сложите кресло - коляску, сведя трубы крестовины вместе.

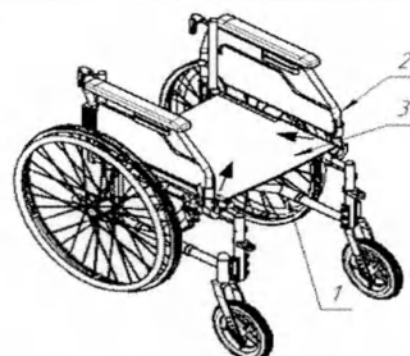

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

64

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

При эксплуатации кресло - коляска должно регулярно проходить техническое обслуживание.

Техническое обслуживание должно включать в себя следующие виды работ:

- ежедневный профилактический осмотр;
- еженедельное техническое обслуживание;
- ежеквартальное техническое обслуживание;
- ежегодное техническое обслуживание.

По мере необходимости рекомендуется проводить техническое обслуживание представителем сервисного центра.

При ежедневном профилактическом осмотре требуется проводить осмотр кресла - коляски на предмет наличия признаков износа или повреждений, в т.ч. должен проводиться осмотр декоративно - защитного покрытия.

	ВНИМАНИЕ!
	Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами

При необходимости требуется очищать поверхность кресла - коляски, оси колес и подвижные элементы кресла - коляски от пыли и грязи влажной салфеткой.

При еженедельном техническом обслуживании необходимо проверять давление в пневматических шинах, целостность ободов и шин, работоспособность тормозных механизмов и ручных фиксаторов, а также исправность аксессуаров.

	ВНИМАНИЕ!
	Не допускается эксплуатация кресла - коляски на спущенных шинах: это может привести к повреждению узлов, элементов кресла и травмированию пользователя

При ежеквартальном техническом обслуживании необходимо проверять целостность и степень натяжения обшивки сиденья и спинки, целостность ремней, застежек и липучек, а также производить протяжку резьбовых соединений, очистку и смазку осей колес и всех подвижных элементов кресла - коляски.

При ежегодном техническом обслуживании необходимо проверять целостность рамы, подлокотников и мягких подкладок.

Дезинфекцию (при необходимости) проводить в соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» МУ-287-113. Допускается протирание поверхностей 1 % раствором моноклорамина ХБ по ГОСТ 14193.

Для чистки обивки и ремней используйте теплую воду и неагрессивное моющее средство. Пятна выводите при помощи губки или мягкой щетки.

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы кресла - коляски необходимо хорошо высушить.

Инв. № подл.	
	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Ин
	дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
65

Шиномонтаж

На случай аварийной ситуации рекомендуем иметь с собой ремкомплект и насос. Причины, по которым шина может спускаться: прокол в камере, проблема с ниппелем.

Если шина спускает по причине прокола камеры, следует действовать по следующему алгоритму:

1. Запомните положение покрышки относительно обода колеса (выполнение этого пункта облегчит поиск предмета, который послужил причиной прокола).

2. Снимите с колеса шину с камерой, аккуратно поддевая ее за край гаечным ключом или пластмассовой дощечкой. Не рекомендуется использовать острые предметы, поскольку можно повредить камеру.

3. Накачайте в камеру воздух, чтобы найти место прокола. Дополнительно можно воспользоваться мыльным раствором или емкостью с водой.

4. Зачистите место прокола.

5. Приклейте заплатку и сильно прижмите.

6. Найдите причину прокола на шине (для облегчения поиска наложите камеру на шину и место заплатки покажет место прокола). Устраните причину прокола.

7. Немного накачайте камеру, расправив складки, и установите камеру обратно, начав за ниппелем.

8. Проверьте, чтобы камера не имела складок.

9. Проверьте отсутствие защемления камеры и правильную установку ниппеля.

10. Накачайте камеру до степени, при которой ее можно сдавить пальцами. Проверьте расстояние по обе стороны покрышки и по всей окружности, оно должно быть одинаковым. Накачайте камеру до рабочего давления 0,25 мПа и плотно заверните колпачок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.40.000.00.00РЭ					Лист
										66

14 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание кресла - коляски могут выполняться исключительно в сервис - центре компании ООО «Ортонака». Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании кресла - коляски, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре или у Вашего регионального представителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

☎ 8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: service@ortonica.ru.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инт	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
67

15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

15.1 Возможные неисправности, которые могут возникнуть во время эксплуатации кресла – коляски, а также способы их устранения указаны в таблице 12.

Таблица 12 - Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Стояночные тормоза не удерживают кресло - коляску в устойчивом положении	Стояночный тормоз отрегулирован неправильно	Отрегулировать стояночный тормоз по горизонтали как указано в п.8 таблицы 9.
Тормоз для сопровождающего лица при нажатии на рычаг не эффективно затормаживает колесо	Давление в пневматических шинах ниже нормы	Подкачать колесо до давления в шинах 0,25 мПа.
	Стояночный тормоз отрегулирован неправильно	Отрегулировать стояночный тормоз по горизонтали как указано в п.8 таблицы 9.
Кресло - коляска не останавливается при нажатии на рукоятку тормоза для сопровождающего лица	Тормозная система неисправна	Обратиться в сервисный центр
	Не отрегулирован стояночный тормоз	Отрегулировать стояночный тормоз по горизонтали как указано в п.8 таблицы 9.
	Нарушение целостности механизма торможения	Обратиться в сервисный центр
Спущено пневматическое колесо (переднее или заднее)	Прокол шины, износ	Провести шиномонтаж как указано в разделе 13 или заменить.
	Упало давление в шине	Подкачать колесо до давления в шине 0,25 мПа.
Не прямолинейность в движении кресла – коляски (увод коляски в сторону)	Недостаточно смазки в подшипниках задних колес	Снять заднее колесо, как указано в п. 10 таблицы 8, очистить от пыли и грязи влажной салфеткой, смазать смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 или аналогичной.
	Упало давление в шине пневматического колеса	Подкачать колесо до давления в шинах 0,25 мПа
	Выход из строя подшипника колеса	Обратиться в сервисный центр
	Трение задних или передних колес о другие элементы (края одежды, покрывала, аксессуары и т.д.)	Устранить трение колеса
Задние приводные колеса снижаются с трудом	Ржавчины на оси и втулке заднего колеса вследствие не качественного технического обслуживания и ухода	Удалить ржавчину с помощью специального чистящего средства («антиржавчина»). Смазать быстросъемную ось и втулку заднего колеса смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 или аналогичной.
	Засорилась ось и втулка заднего колеса	Очистить ось и втулку от пыли и грязи влажной салфеткой, смазать смазкой ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 или аналогичной.

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

68

15.2 При возникновении более серьезных неисправностей, связанных с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисную службу предприятия - изготовителя.

	ВНИМАНИЕ!
	Ремонт кресла – коляски собственными силами не разрешается

Работы по ремонту кресла - коляски, и также замене несъемных, изношенных или вышедших из строя элементов должны выполняться только сервисными инженерами.

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
69

16 МАРКИРОВКА

16.1 Маркировка кресла - коляски соответствует ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 51083, ГОСТ Р ИСО 7176-15, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 1.3 и ТУ 30.92.20-019-66445146-2024.

16.2 Маркировка изложена на русском и английском языках.

16.3 На крестовине кресла - коляски прикреплена идентификационная этикетка с указанием:

- товарного знака предприятия – изготовителя;
- наименования кресла - коляски с обозначением настоящих технических условий;
- варианта исполнения и размера кресла - коляски;
- наименования и адреса предприятия - изготовителя;
- кода ОКПД2;
- номера регистрационного удостоверения на кресло - коляску;
- артикула кресла - коляски;
- серийного номера кресла - коляски;
- даты изготовления кресла - коляски (год, месяц);
- максимальной массы пользователя;
- штрих – кода с информацией, идентифицирующей основные характеристики кресла - коляски;

– надписи страны производства: "Сделано в России".

16.4 На шинах колес кресла - коляски нанесена маркировка их размеров.

На покрышках пневматических колес нанесена маркировка с обозначением максимального давления воздуха в шинах в Паскалях.

16.5 На каждую транспортную упаковку, в которую помещается кресло - коляска, нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Не допускать воздействия влаги», «Верх».

Так же на транспортную упаковку приклеена этикетка с указанием:

- наименования кресла - коляски с обозначением настоящих технических условий;
- варианта исполнения и размера кресла - коляски;
- массы брутто;
- массы нетто;
- количества кресел - колясок в транспортной упаковке;
- ширины сиденья;
- типа шин;
- максимальной массы пользователя;
- артикула кресла - коляски;
- серийного номера кресла - коляски;
- наименования и адреса предприятия - изготовителя;
- даты изготовления кресла - коляски (года, месяца);
- номера регистрационного удостоверения на кресло - коляску;
- кода ОКПД2;
- надписи страны производства: "Сделано в России";
- штрих – кода с информацией, идентифицирующей основные характеристики кресла - коляски;
- товарного знака предприятия – изготовителя;
- манипуляционный знак «Хрупкое, обращаться осторожно» и «Обратитесь к инструкции по применению»;
- условия хранения: температурный диапазон, диапазон влажности, диапазон атмосферного давления;
- условия транспортирования: температурный диапазон, диапазон влажности, диапазон атмосферного давления.

16.6 Маркировка выполнена способом, обеспечивающим устойчивость надписей к воздействию факторам внешней среды в процессе эксплуатации


66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

70

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

16.7 Расшифровка символов, применяемых в маркировке транспортной упаковки кресла – коляски:

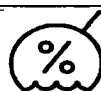Изображение символа	Наименование символа
	Изготовитель
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Диапазон атмосферного давления
	Верх (указывает правильное вертикальное положение)
	Не допускать воздействия влаги

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
71

17 УПАКОВКА

17.1 Упаковка обеспечивает сохранность кресла - коляски и исключает попадание загрязнений из внешней среды, в ненарушенном состоянии упаковка защищает от внешних воздействий.

Упаковка кресла - коляски гарантирует достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения.

17.2 Перед упаковыванием кресло - коляска подвергается консервации по ГОСТ 9.014. Вариант защиты – ВЗ-10, вариант внутренней упаковки – ВУ-5. Срок защиты – 2 года.

17.3 Упаковка кресла - коляски соответствует чертежам предприятия - изготовителя.

17.4 Эксплуатационные и товаросопроводительные документы вкладываются в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, пакет запаян и вложен в транспортную упаковку.

17.5 Для транспортировки кресло - коляска вложено в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложено в короб из пятислойного гофрированного или другую тару, исключаящую его повреждение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
66445146.942815.40.000.00.00РЭ					Лист
					72

18 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или списания в результате выхода из строя, кресло - коляска подлежит утилизации. Допускается утилизация кресла - коляски вместе с бытовыми отходами. Кресло - коляска относится к классу А (эпидемиологически безопасные отходы, Сан-ПиН 2.1.3684-21).

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
73

19 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

19.1 Предприятие - изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

19.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

19.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

19.4 При покупке товара необходимо контролировать правильное заполнение гарантийного талона: проставления печати продавца и даты продажи.

19.5 Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки о дате продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

19.6 В случае обнаружения неисправностей в кресле - коляске в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

19.7 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

19.8 Предприятие - изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать кресло - коляску вплоть до замены ее в целом, если за этот срок кресло - коляска выйдет из строя или ухудшатся ее характеристики, установленные настоящими техническими условиями.

19.9 Предприятие - изготовитель не несет ответственности в случае повреждений кресла - коляски, возникших из-за неправильной эксплуатации:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящем руководстве по эксплуатации;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломок деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- наезда на препятствия высотой более 40 мм;
- перемещений в кресле - коляске на спущенных шинах;
- проколах камер в шинах колес и т.п.

19.10 Гарантийные обязательства не распространяются на части кресла - коляски, подверженные естественному износу, такие как покрышки, камеры покрышек, текстильные элементы.

19.11 При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием кресла - коляски, необходимо обратиться в сервисный центр компании производителя.

19.12 Срок службы кресла - коляски – 6 лет.

Имп. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	дубл.
Ин	
Подп. и дата	
Имп. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

74

20 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Обозначение документа	
ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология	
ГОСТ Р 58266-2018 Кресла - коляски. Термины и определения. Классификация	
ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска	
ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования	
ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования	
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	
ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресла - коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования	
ГОСТ Р 51083-2021 Кресла - коляски с ручным приводом. Общие технические условия	
ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний	
ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла - коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность	
ГОСТ 14193-78 Монохлорамин ХБ технический. Технические условия	
ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору	
ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации	
ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения	
ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла - коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации	
ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла - коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела	
ГОСТ Р 52770-2023 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности	
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения	
ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования	
ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля	
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования	
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия	
ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла - коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса	
ГОСТ Р ИСО 7176-1-2018 Кресла - коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости	
ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 Кресла - коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы	
ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения	
ГОСТ Р 27.607 – 2013 Надежность в технике. Управление надежностью. Условия проведения испытаний на безотказность и статистические методы оценки результатов	
РД 50-690-89 Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экс-	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
75

периментальным данным
ГОСТ Р 27.303-2021 Надежность в технике. Анализ видов и последствий отказов
ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ Р 1.3-2018 Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению
МУ-287-113 Методические указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
ГОСТ ISO 14971-2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ Р 58522-2019 Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования
ГОСТ 6267-2021 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
76

21 РЕКЛАМАЦИИ

В случае отказа кресла - коляски в работе или неисправности ее в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке кресла - коляски, потребитель должен обратиться в сервисный центр изготовителя.

Контакты сервисного центра:

ООО «Реамед»,

394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11,

Телефон: 8 (800) 707-44-52,

☎ 8 (950) 756-67-25 Whatsapp

E-mail: service@ortonica.ru.

При ведении рекламационной работы составляются акты, приведенные в приложении

А.

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	66445146.942815.40.000.00.00РЭ	Лист
						77

22 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____, серийный номер
_____, соответствует ТУ 30.92.20-018-66445146-2018 и признана годной для
эксплуатации.

Параметры и характеристики кресла - коляски с ручным приводом складного Ortonica по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024 в варианте исполнения _____, серийный номер _____, приведены в приложении А.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

[illegible]

23 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica по
ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, вариант исполнения _____, серийный номер
_____, упакована на предприятии - изготовителе согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.40.000.00.00РЭ					Лист
										79

24 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло - коляска с ручным приводом складное Ortonica
по ТУ 30.92.20-019-66445146-2024, варианты исполнения: _____
Серийный номер _____

Дата покупки (отмечается продавцом в гарантийном талоне) _____
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия

С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознаком-
лен.

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею

_____ (подпись покупателя)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	66445146.942815.40.000.00.00РЭ	Лист
												80

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Рекомендуемое)

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

г. _____

«__» _____ 202_ г.

Исполнитель: ООО «Размед», ИНН: 3662167254, КПП: 366201001, ОГРН: 1113668031531, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 11

Пользователь	
ФИО	
Адрес	
Телефон	
E-mail	

Техническое средство реабилитации (ТСР)	
Наименование, модель	
Серийный номер (при наличии)	
Размер	
Цвет	
Иные характеристики	
Комплектность	
Дата приобретения ТСР	

Дата обращения	
Способ обращения	

Причина обращения (заполняется со слов клиента)

Дата осмотра ТСР	
------------------	--

Описание и внешнее состояние ТСР на дату проведения осмотра

Диагностические мероприятия и выявленные причины неисправности

Комплекующие к замене

Заключение

Указывается гарантийный или не гарантийный случай. Если принято решение о проведении гарантийного ремонта, то рекомендуется указывать действия, которые требуется совершить: ремонт, замена.

ООО «Размед»

(подпись)
М.П.

(подпись, наименование)

(подпись)

(подпись, наименование)

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист

81

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № _____

г. _____

«__» _____ 202_ г.

Исполнитель: ООО «Реамед», ИНН: 3662167254, КПП: 366201001, ОГРН: 1113668031531, 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 11

Пользователь	
ФИО	
Адрес	
Телефон	
E-mail	

Техническое средство реабилитации (ТСР)	
Наименование, модель	
Серийный номер (при наличии)	
Размер	
Цвет	
Иные характеристики	
Комплектность	

Перечень проведенных работ:

Перечень замененных деталей и использованных запчастей

Дополнительная информация

Стороны подтверждают, что техническое средство реабилитации находится в технически исправном состоянии и пригодно к эксплуатации. Техническое средство реабилитации Пользователем получено, претензий по качеству, в том числе к его комплектности, и срокам гарантийного ремонта Пользователь не имеет.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ООО «Реамед»

(подпись) (фамилия, инициалы)
м.п.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ин	дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

66445146.942815.40.000.00.00РЭ

Лист
82

[illegible]

Лист

83

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Прошнуровано и пронумеровано

83 лист a

Генеральный Директор

ООО «Ортоника»

Ю.А. Титаренко

