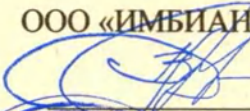


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В. Осипова

«12» февраля 2024 г.




Проект маркировки

Набор реагентов для генерации хемилюминесцентного сигнала для анализатора
LUMILAB «Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-606-41390295-2023

2024 г.

Активатор- LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

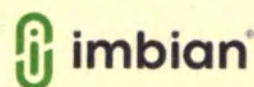


Набор реагентов для генерации хемилюминесцентного сигнала для анализатора LUMILAB «Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-606-41390295-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Замораживание не допускается. Для профессионального применения.

Состав:

1. Активатор 1, 500 мл _____ 1 шт.
2. Активатор 2, 500 мл _____ 1 шт.
3. Инструкция по применению _____ 1 шт.

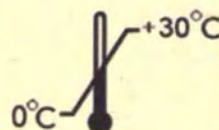

Активатор- LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



02-1123



FC-002/2000.1



2023-11-10



2024-11-10



ООО «ИМБИАН ЛАБ»,
630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; +7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

Активатор- LUMILAB- ИМБИАН-ИХЛА

Набор реагентов для генерации
хемилюминесцентного сигнала для
анализатора LUMILAB
«Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-606-41390295-2023

Количество _____ шт.

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто	кг	Масса брутто	кг
Масса нетто потребительской упаковки			кг

LOT 02-1123

Замораживание не допускается.

REF FC-002/2000.1

 **imbian®**

 2023-11-10

 2024-11-10

 +30°C
0°C

IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»,
630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; +7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

Активатор 1



Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



500 мл

LOT

02-1123



2024-11-10

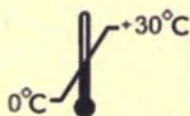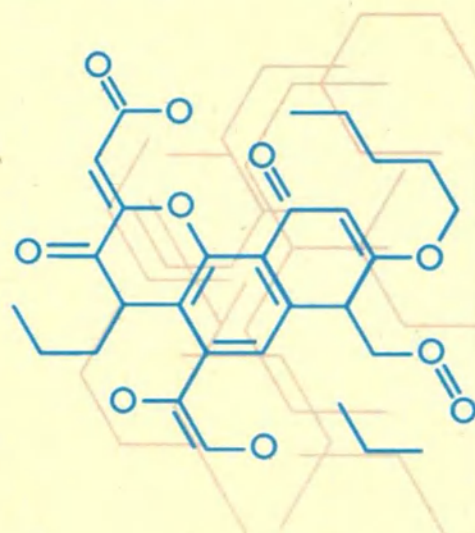


IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Активатор 2

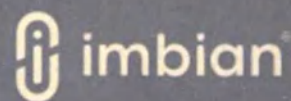

Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА


500 мл

LOT


02-1123



2024-11-10

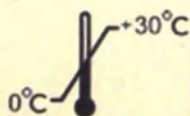

IVD

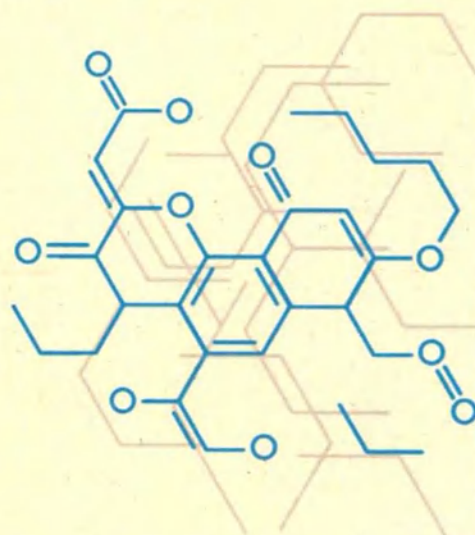

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



лист 06
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова "6" 02 2024

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В. Осипова

«16» января 2024 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для генерации хемилюминесцентного сигнала для анализатора LUMILAB

«Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-606-41390295-2023

2024 г.

Общий вид медицинского изделия



Активатор- LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



LOT 02-T123 REF PC-002/2000.1

2023-11-10 2024-11-10



ООО «ИМБИАН ЛАБ»,
630081, Россия, Новосибирская область, г.а. район «Лесной» Новосибирск, р.а. Кемерово,
ул. Савельева, д. 3/7, этаж 2, пом. 2, «Г» (ИНН 50-04-04); [www.imbiyanlab.ru](mailto:info@imbiyanlab.ru) info@imbiyanlab.ru

Инструкция по применению медицинского
изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для генерации
хемилуминесцентного сигнала для
анализатора LUMILAB «Активатор-
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-
606-41390295-2023

ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению
распространяется на медицинское изделие: «Набор
реагентов для генерации хемилуминесцентного
сигнала для анализатора LUMILAB «Активатор-
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-606-
41390295-2023» (далее активатор, изделие
«Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»).

Изделие выпускается в одном базовом варианте
исполнения
Набор реагентов для генерации
хемилуминесцентного сигнала для анализатора
LUMILAB «Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-606-41390295-2023

Состав:
Активатор 1, 500 мл – 1 шт.;
Активатор 2, 500 мл – 1 шт.

Активатор 1



Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА
500 мл

LOT 02-T123

2024-11-10



Активатор 2

Активатор-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА
500 мл

LOT 02-T123

2024-11-10




Активатор 1





Активатор 2



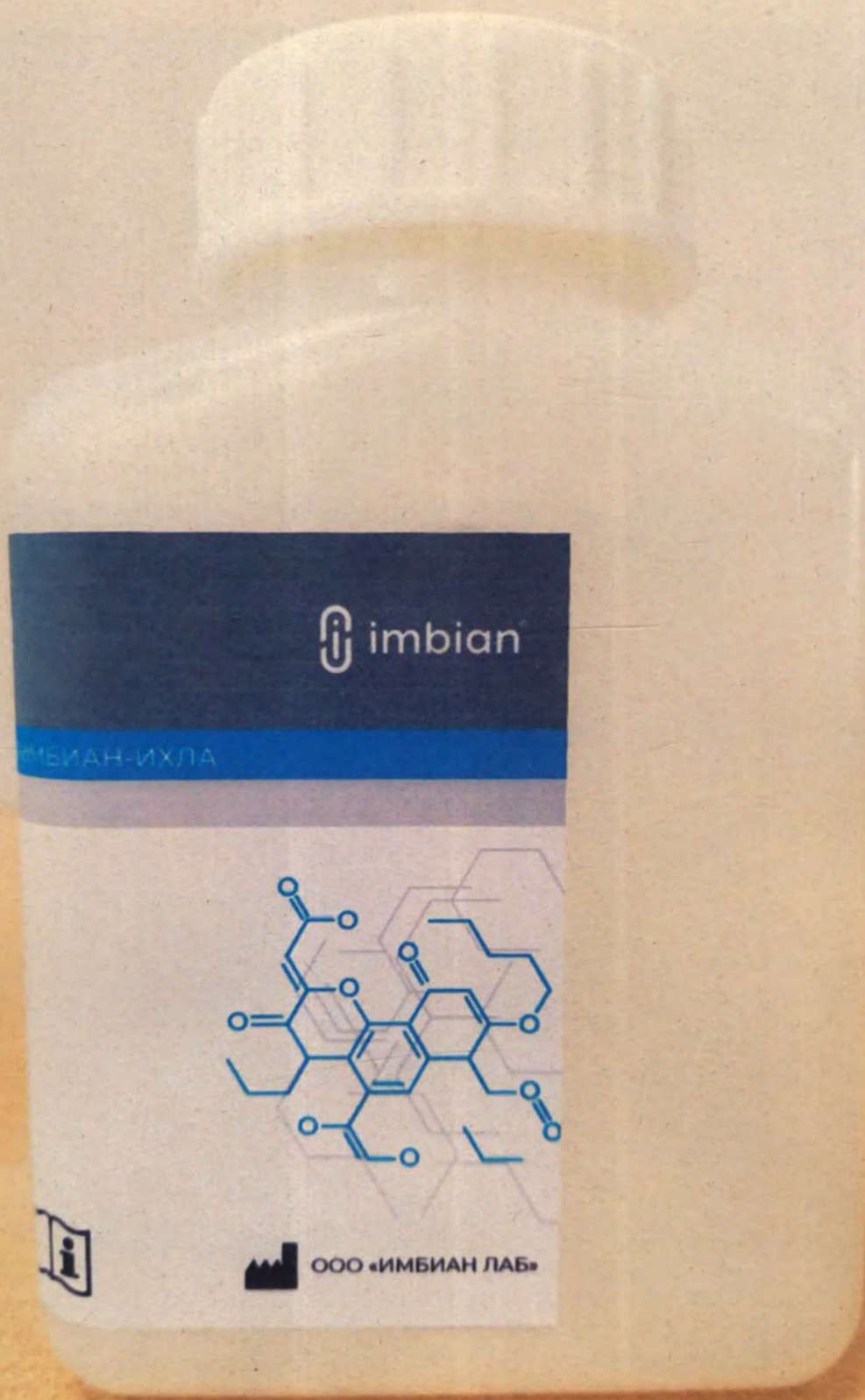

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 26

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова "16" 01 2024

