

Тел/факс: (812) 322-7373 (многоканальный)
<http://www.storm-spb.ru>

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сторм-СПБ»

В.А. Куц



«08» сентября 2015 г.

Мойки медицинские хирургические
по ТУ 9451-001-38054725-2015
Руководство по эксплуатации

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	3
3.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
4.	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
5.	УХОД ЗА МОЙКАМИ	3
6.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
7.	УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	8
8.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	8
9.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
10.	МАРКИРОВКА	8
11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8
12.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на Мойки медицинские хирургические по ТУ 9451-001-38054725-2015 (далее по тексту – мойки, изделие, изделия), предназначенные для тщательного мытья рук хирургической бригады перед операцией и после неё.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения широкого профиля.

Мойки медицинские хирургические выпускаются в следующих исполнениях: (см. Приложение 1).

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания отсутствуют.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Используйте изделие только в соответствии с ее функциональным назначением. Сохранность и долговечность изделия зависит не только от её качества, но и от условий эксплуатации. При транспортировке и хранении моек в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Важно. Сборка и монтаж мебели осуществляется предприятием-изготовителем или уполномоченным аккредитованным представителем предприятия-изготовителя. Не допускается самостоятельный монтаж и сборка потребителем. Монтажные чертежи приведены в приложении 2.

4.2 Винты М8х25, шайбы плоские М8 и гайки М8 предназначены для крепления мойки к кронштейну.

4.3 Винты М6х16 предназначены для крепления защитного кожуха.

4.4 Заглушки ЗМ предназначены для маскировки крепежных элементов мойки, заглушки ЗК предназначены для маскировки крепежных элементов защитного кожуха.

4.5 Стеновая и боковые панели защищают от брызг.

4.6 Кронштейн предназначен для крепления мойки к стене.

4.7 Защитный кожух предназначен для скрытия сантехнических коммуникаций. Съемный кожух обеспечивает доступ к сантехническим коммуникациям для удобства монтажа и сервисного обслуживания.

4.8 Не проводите по поверхности и не ударяйте мойки острыми или тяжелыми твердыми предметами.

4.9 Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткие губки, а также не допускается применение концентрированных кислот и сильных щелочей, поскольку они могут повредить поверхность моек.

4.10 Климатическое исполнение моек: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

5. УХОД ЗА МОЙКАМИ

5.1 Мойки медицинские хирургические, изготовленные из акрилового искусственного камня должны подвергаться регулярной очистке. Поверхность искусственного камня лишена пор, поэтому любую грязь легко удалить с помощью обычной мягкой губки и средством для чистки, которое не содержит абразивных частиц. ВНИМАНИЕ! Для удаления загрязнений не следует применять порошки для чистки, металлические - ершики и очень жесткие мочалки, которые могут поцарапать или иным образом повредить поверхность мойки.

5.2 Многие производители выпускают специальные линии средств для ухода за искусственным камнем. Они безопасны для поверхности, имеют мягкое действие, при этом не оставляют разводов, следов или царапин. Выбрать подходящий состав не сложно, на каждом продукте указано для каких поверхностей и типа загрязнений он предназначен.

5.3 Для дезинфекции можно использовать 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Они не повреждают поверхность, не образуют налет и удаляются бесследно.

5.4 Важным этапом после очистки моющим средством или после дезинфекции является

тщательное ополаскивание большим количеством воды и высушивание.

Персонал, проводящий очистку и дезинфекцию, должен обеспечить надлежащую вентиляцию помещения, соблюдать правила использования защитного снаряжения и соблюдать правила защиты труда.

5.5 При любых повреждениях мойки из искусственного камня можно отремонтировать. В ходе ремонта дефектные места заполняются композитным составом, при этом устраняются мелкие и крупные трещины, сколы, любые неровности. Технология может меняться в зависимости от вида и размера повреждения. Если в результате неправильной эксплуатации или плохого ухода мойка потеряла привлекательный вид, появились царапины — то ее можно будет отшлифовать и вернуть изначальную красоту.

5.6 Обслуживание и гарантийный, а также пост-гарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный (аккредитованный) представитель.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Габаритные размеры моек должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Исполнение	Кол-во чашек	Глубина чаши, ±2 мм	Габаритные размеры мойки, Д x Ш x В, ±3 мм
1	ММХГ-1-А, ММХГ-1-Б, ММХГ-1-В, ММХГ-1-Г	1	220	760x600x605
2	ММХГ-2-А, ММХГ-2-Б, ММХГ-2-В, ММХГ-2-Г	2	220	1600x600x605
3	ММХГ-3-А, ММХГ-3-Б, ММХГ-3-В, ММХГ-3-Г	3	220	2400x600x605
4	ММХМ-1-А, ММХМ-1-Б, ММХМ-1-В, ММХМ-1-Г	1	154	760x560x376
5	ММХМ-2-А, ММХМ-2-Б, ММХМ-2-В, ММХМ-2-Г	2	154	1600x560x376
6	ММХМ-3-А, ММХМ-3-Б, ММХМ-3-В, ММХМ-3-Г	3	154	2400x560x376
7	ММХС-1-А, ММХС-1-Б, ММХС-1-В, ММХС-1-Г	1	154	760x560x376
8	ММХС-2-А, ММХС-2-Б, ММХС-2-В, ММХС-2-Г	2	154	1600x560x376
9	ММХС-3-А, ММХС-3-Б, ММХС-3-В, ММХС-3-Г	3	154	2400x560x376

6.2 Масса моек должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

№	Исполнение	Масса, ± 0,05 кг
1	ММХГ-1-А, ММХГ-1-Б, ММХГ-1-В, ММХГ-1-Г	15.3
2	ММХГ-2-А, ММХГ-2-Б, ММХГ-2-В, ММХГ-2-Г	30.6
3	ММХГ-3-А, ММХГ-3-Б, ММХГ-3-В, ММХГ-3-Г	45.9
4	ММХМ-1-А, ММХМ-1-Б, ММХМ-1-В, ММХМ-1-Г	14.5
5	ММХМ-2-А, ММХМ-2-Б, ММХМ-2-В, ММХМ-2-Г	29
6	ММХМ-3-А, ММХМ-3-Б, ММХМ-3-В, ММХМ-3-Г	43.5
7	ММХС-1-А, ММХС-1-Б, ММХС-1-В, ММХС-1-Г	14
8	ММХС-2-А, ММХС-2-Б, ММХС-2-В, ММХС-2-Г	28
9	ММХС-3-А, ММХС-3-Б, ММХС-3-В, ММХС-3-Г	42

6.3 Изделия должны изготавливаться из материалов, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование	Используемый материал	Материал, контактируемый с медперсоналом и (или) пациентом
1	Мойки медицинские хирургические: ММХГ-1-А, ММХГ-2-А, ММХГ-3-А, ММХМ-1-А, ММХМ-2-А, ММХМ-3-А, ММХС-1-А, ММХС-2-А, ММХС-3-А	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (34%)	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (34%)
2	Мойки медицинские хирургические: ММХГ-1-Б, ММХГ-2-Б, ММХГ-3-Б, ММХМ-1-Б, ММХМ-2-Б, ММХМ-3-Б, ММХС-1-Б, ММХС-2-Б, ММХС-3-Б	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)

Продолжение таблицы 3

3	Мойки медицинские хирургические: ММХГ-1-В, ММХГ-2-В, ММХГ-3-В, ММХМ-1-В, ММХМ-2-В, ММХМ-3-В, ММХС-1-В, ММХС-2-В, ММХС-3-В	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)
4	Мойки медицинские хирургические: ММХГ-1-Г, ММХГ-2-Г, ММХГ-3-Г, ММХМ-1-Г, ММХМ-2-Г, ММХМ-3-Г, ММХС-1-Г, ММХС-2-Г, ММХС-3-Г	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)
5	Стеновая панель исполнений: С-1-А, С-2-А, С-3-А, СПБ-1-А, СПБ-2-А, СПБ-3-А	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (34%)	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (34%)
6	Стеновая панель исполнений: С-1-Б, С-2-Б, С-3-Б, СПБ-1-Б, СПБ-2-Б, СПБ-3-Б	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)
7	Стеновая панель исполнений: С-1-В, С-2-В, С-3-В, СПБ-1-В, СПБ-2-В, СПБ-3-В	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)
8	Стеновая панель исполнений: С-1-Г, С-2-Г, С-3-Г, СПБ-1-Г, СПБ-2-Г, СПБ-3-Г	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)
9	Защитный кожух исполнений: К-А	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (34%)	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (34%)
10	Защитный кожух исполнений: К-Б	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)
11	Защитный кожух исполнений: К-В	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)
12	Защитный кожух исполнений: К-Г	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)
13	Боковая панель исполнения: ПБ-А	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (34%)	Композитный материал Corian® Glacier White: тригидрат алюминия $Al(OH)_3$ (66%), метилметакрилат (34%)

Продолжение таблицы 3

14	Боковая панель исполнения: ПБ-Б	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)	Композитный материал Corian® Silver Gray: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (33%), пигмент серебристый TER 8180 (1%)
15	Боковая панель исполнения: ПБ-В	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)	Композитный материал Corian® Serpentine Green: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (33%), пигмент зеленый S5605 (1%)
16	Боковая панель исполнения: ПБ-Г	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)	Композитный материал Corian® Ethereal Azure: тригидрат алюминия AL(OH)3 (66%), метилметакрилат (32%), пигмент синий 463(2%)
17	Кронштейн	Сталь 20. Покрытие: краска порошковая полиэфирная	нет контакта
18	Винт М8х25	Нержавеющая сталь А2	нет контакта
19	Гайка М8	Нержавеющая сталь А2	нет контакта
20	Шайба плоская М8	Нержавеющая сталь А2	нет контакта
21	Заглушки ЗМ, ЗК	Поливинилхлорид марки СИ-64	Поливинилхлорид марки СИ-64
22	Винт М6х16	Нержавеющая сталь А2	нет контакта

6.4 Диаметр отверстия для установки выпуска должен быть 52 ± 1 мм.

6.5 Габаритные размеры защитного кожуха, должны соответствовать:

- длина 340 ± 1 мм;
- ширина 304 ± 1 мм;
- высота 145 ± 1 мм;

6.6 Масса защитного кожуха для исполнений К-А, К-Б, К-В, К-Г должна быть $3,7 \pm 0,015$ кг.

6.7 Защитный кожух выполнен в четырех цветах:

- К-А – Glacier White;
- К-Б – Silver Gray;
- К-В – Serpentine Green;
- К-Г – Ethereal Azure.

6.8 Внешний вид и размеры кронштейна, представлены на рисунке 1.

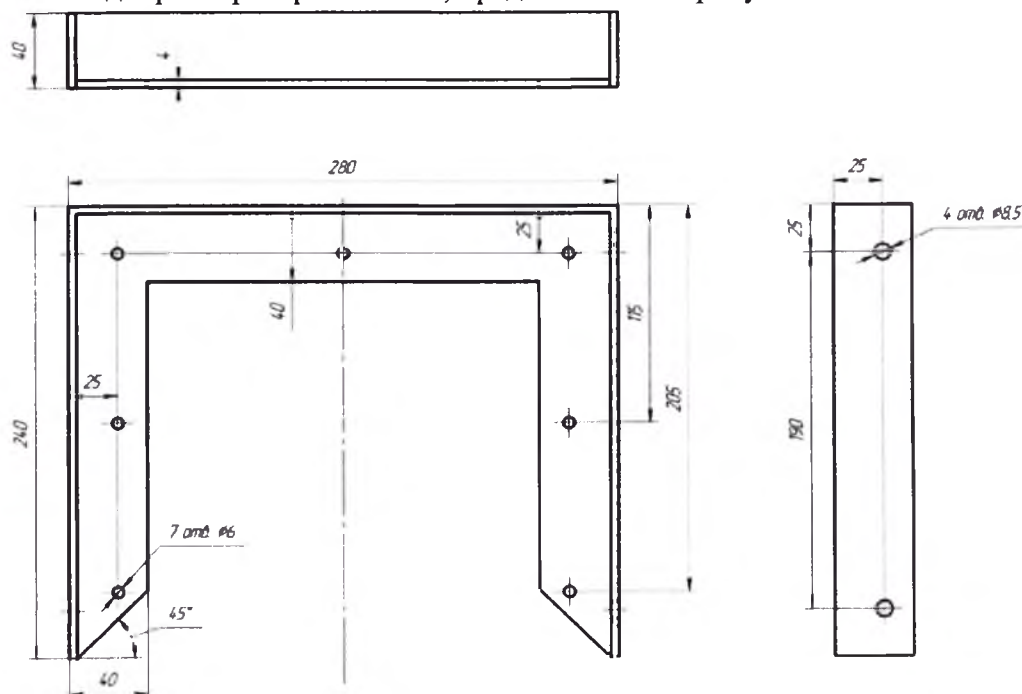


Рисунок 1 – Кронштейн

6.9 Масса кронштейна должна быть $1,6 \pm 0,01$ кг.

6.10 Габаритные размеры стеновой панели исполнений: С-1-А, С-1-Б, С-1-В, С-1-Г должны соответствовать:

- длина 760 ± 2 мм;
- высота 600 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.11 Габаритные размеры стеновой панели исполнений: С-2-А, С-2-Б, С-2-В, С-2-Г должны соответствовать:

- длина 1600 ± 2 мм;
- высота 600 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.12 Габаритные размеры стеновой панели исполнений: С-3-А, С-3-Б, С-3-В, С-3-Г должны соответствовать:

- длина 2400 ± 2 мм;
- высота 600 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.13 Габаритные размеры стеновой панели исполнений: СПБ-1-А, СПБ-1-Б, СПБ-1-В, СПБ-1-Г должны соответствовать:

- длина 736 ± 2 мм;
- высота 500 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.14 Габаритные размеры стеновой панели исполнений: СПБ-2-А, СПБ-2-Б, СПБ-2-В, СПБ-2-Г должны соответствовать:

- длина 1576 ± 2 мм;
- высота 500 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.15 Габаритные размеры стеновой панели исполнений: СПБ-3-А, СПБ-3-Б, СПБ-3-В, СПБ-3-Г должны соответствовать:

- длина 2376 ± 2 мм;
- высота 500 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.16 Масса стеновой панели должна соответствовать таблице 4.

Таблица 4

№	Исполнение	Масса, $\pm 0,05$ кг
1	С-1-А, С-1-Б, С-1-В, С-1-Г	9,3
2	С-2-А, С-2-Б, С-2-В, С-2-Г	18,6
3	С-3-А, С-3-Б, С-3-В, С-3-Г	27,9
4	СПБ-1-А, СПБ-1-Б, СПБ-1-В, СПБ-1-Г	7,5
5	СПБ-2-А, СПБ-2-Б, СПБ-2-В, СПБ-2-Г	15
6	СПБ-3-А, СПБ-3-Б, СПБ-3-В, СПБ-3-Г	22,5

6.17 Габаритные размеры боковой панели исполнений: ПБ-А, ПБ-Б, ПБ-В, ПБ-Г должны соответствовать:

- длина 350 ± 1 мм;
- высота 600 ± 2 мм;
- толщина $12 \pm 0,5$ мм.

6.18 Масса боковой панели исполнений: ПБ-А, ПБ-Б, ПБ-В, ПБ-Г должны быть $3,3 \pm 0,015$ кг.

6.19 Боковая панель выполнена в четырех цветах:

- ПБ-А – Glacier White;
- ПБ-Б – Silver Gray;
- ПБ-В – Serpentine Green;
- ПБ-Г – Ethereal Azure.

7. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.2 Мойки должны быть собраны и переданы специальным лицензированным организациям, занимающимся утилизацией медицинских отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Мойки следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

8.2 При транспортировании моек в районы Крайнего Севера и в труднодоступные районы тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846.

8.3 Условия транспортирования моек должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

8.4 Мойки должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Мойки медицинские хирургические по ТУ 9451-001-38054725-2015*	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Гарантийный талон	1

*- исполнение выбирается Заказчиком из числа представленных: (см. Приложение 1)

10. МАРКИРОВКА

10.1 Символы, используемые для маркировки.

- символ «Дата изготовления»



(год/месяц)

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Гарантийный срок эксплуатации моек - два года со дня сдачи в эксплуатацию или продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Сторм-СПБ»

Юридический адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Косая линия, дом 13, литер. А, телефон: +7 (812)322-73-73, e-mail: stormspb2012@gmail.com

Приложение 1

I. Мойки медицинские хирургические по ТУ 9451-001-38054725-2015, варианты исполнений:

1. ММХГ-1-А, в составе:

1.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с одной чашей ММХГ-1-А – 1 шт.;

1.2 Кронштейн – 1 шт.;

1.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

1.4 Гайки М8 – 4 шт.;

1.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

1.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

1.7 Принадлежности:

1.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-А, СПБ-1-А;

1.7.2 Боковая панель ПБ-А – 2 шт.;

1.7.3 Защитный кожух, в составе:

1.7.3.1 Защитный кожух К-А – 1 шт.;

1.7.3.2 Винты М6х16 – 3 шт.;

1.7.3.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

2. ММХГ-1-Б, в составе:

2.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с одной чашей ММХГ-1-Б – 1 шт.;

2.2 Кронштейн – 1 шт.;

2.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

2.4 Гайки М8 – 4 шт.;

2.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

2.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

2.7 Принадлежности:

2.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-Б, СПБ-1-Б;

2.7.2 Боковая панель ПБ-Б – 2 шт.;

2.7.3 Защитный кожух, в составе:

2.7.3.1 Защитный кожух К-Б – 1 шт.;

2.7.3.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

2.7.3.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

3. ММХГ-1-В, в составе:

3.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с одной чашей ММХГ-1-В – 1 шт.;

3.2 Кронштейн – 1 шт.;

3.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

3.4 Гайки М8 – 4 шт.;

3.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

3.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

3.7 Принадлежности:

3.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-В, СПБ-1-В;

3.7.2 Боковая панель ПБ-В – 2 шт.;

3.7.3 Защитный кожух, в составе:

3.7.3.1 Защитный кожух К-В – 1 шт.;

3.7.3.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

3.7.3.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

4. ММХГ-1-Г, в составе:

4.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с одной чашей ММХГ-1-Г – 1 шт.;

4.2 Кронштейн – 1 шт.;

4.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

4.4 Гайки М8 – 4 шт.;

4.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

4.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

4.7 Принадлежности:

4.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-Г, СПБ-1-Г;

- 4.7.2 Боковая панель ПБ-Г – 2 шт.;
- 4.7.3 Защитный кожух, в составе:
 - 4.7.3.1 Защитный кожух К-Г – 1 шт.;
 - 4.7.3.2. Винты М6х16 – 3 шт.;
 - 4.7.3.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

5. ММХГ-2-А, в составе:

- 5.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с двумя чашами ММХГ-2-А – 1 шт.;
- 5.2 Кронштейн – 2 шт.;
- 5.3 Винты М8х25 – 8 шт.;
- 5.4 Гайки М8 – 8 шт.;
- 5.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;
- 5.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.
- 5.7 Принадлежности:
 - 5.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-А, СПБ-2-А;
 - 5.7.2 Боковая панель ПБ-А – 2 шт.;
 - 5.7.3 Защитный кожух, в составе:
 - 5.7.3.1 Защитный кожух К-А – 2 шт.;
 - 5.7.3.2. Винты М6х16 – 6 шт.;
 - 5.7.3.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

6. ММХГ-2-Б, в составе:

- 6.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с двумя чашами ММХГ-2-Б – 1 шт.;
- 6.2 Кронштейн – 2 шт.;
- 6.3 Винты М8х25 – 8 шт.;
- 6.4 Гайки М8 – 8 шт.;
- 6.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;
- 6.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.
- 6.7 Принадлежности:
 - 6.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-Б, СПБ-2-Б;
 - 6.7.2 Боковая панель ПБ-Б – 2 шт.;
 - 6.7.3 Защитный кожух, в составе:
 - 6.7.3.1 Защитный кожух К-Б – 2 шт.;
 - 6.7.3.2. Винты М6х16 – 6 шт.;
 - 6.7.3.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

7. ММХГ-2-В, в составе:

- 7.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с двумя чашами ММХГ-2-В – 1 шт.;
- 7.2 Кронштейн – 2 шт.;
- 7.3 Винты М8х25 – 8 шт.;
- 7.4 Гайки М8 – 8 шт.;
- 7.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;
- 7.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.
- 7.7 Принадлежности:
 - 7.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-В, СПБ-2-В;
 - 7.7.2 Боковая панель ПБ-В – 2 шт.;
 - 7.7.3 Защитный кожух, в составе:
 - 7.7.3.1 Защитный кожух К-В – 2 шт.;
 - 7.7.3.2. Винты М6х16 – 6 шт.;
 - 7.7.3.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

8. ММХГ-2-Г, в составе:

- 8.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с двумя чашами ММХГ-2-Г – 1 шт.;
- 8.2 Кронштейн – 2 шт.;
- 8.3 Винты М8х25 – 8 шт.;
- 8.4 Гайки М8 – 8 шт.;
- 8.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

8.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

8.7 Принадлежности:

8.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-Г, СПБ-2-Г;

8.7.2 Боковая панель ПБ-Г – 2 шт.;

8.7.3 Защитный кожух, в составе:

8.7.3.1 Защитный кожух К-Г – 2 шт.;

8.7.3.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

8.7.3.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

9. ММХГ-3-А, в составе:

9.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с тремя чашами ММХГ-3-А – 1 шт.;

9.2 Кронштейн – 3 шт.;

9.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

9.4 Гайки М8 – 12 шт.;

9.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

9.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

9.7 Принадлежности:

9.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-А, СПБ-3-А;

9.7.2 Боковая панель ПБ-А – 2 шт.;

9.7.3 Защитный кожух, в составе:

9.7.3.1 Защитный кожух К-А – 3 шт.;

9.7.3.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

9.7.3.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

10. ММХГ-3-Б, в составе:

10.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с тремя чашами ММХГ-3-Б – 1 шт.;

10.2 Кронштейн – 3 шт.;

10.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

10.4 Гайки М8 – 12 шт.;

10.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

10.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

10.7 Принадлежности:

10.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-Б, СПБ-3-Б;

10.7.2 Боковая панель ПБ-Б – 2 шт.;

10.7.3 Защитный кожух, в составе:

10.7.3.1 Защитный кожух К-Б – 3 шт.;

10.7.3.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

10.7.3.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

11. ММХГ-3-В, в составе:

11.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая тремя чашами ММХГ-3-В – 1 шт.;

11.2 Кронштейн – 3 шт.;

11.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

11.4 Гайки М8 – 12 шт.;

11.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

11.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

11.7 Принадлежности:

11.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-В, СПБ-3-В;

11.7.2 Боковая панель ПБ-В – 2 шт.;

11.7.3 Защитный кожух, в составе:

11.7.3.1 Защитный кожух К-В – 3 шт.;

11.7.3.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

11.7.3.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

12. ММХГ-3-Г, в составе:

- 12.1 Мойка медицинская хирургическая глубокая с тремя чашами ММХГ-3-Г – 1 шт.;
- 12.2 Кронштейн – 3 шт.;
- 12.3 Винты М8х25 – 12 шт.;
- 12.4 Гайки М8 – 12 шт.;
- 12.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;
- 12.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.
- 12.7 Принадлежности:
 - 12.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-Г, СПБ-3-Г;
 - 12.7.2 Боковая панель ПБ-Г – 2 шт.;
 - 12.7.3 Защитный кожух, в составе:
 - 12.7.3.1 Защитный кожух К-Г – 3 шт.;
 - 12.7.3.2. Винты М6х16 – 9 шт.;
 - 12.7.3.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

13. ММХМ-1-А, в составе:

- 13.1 Мойка медицинская хирургическая макси с одной чашей ММХМ-1-А – 1 шт.;
- 13.2 Кронштейн – 1 шт.;
- 13.3 Винты М8х25 – 4 шт.;
- 13.4 Гайки М8 – 4 шт.;
- 13.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- 13.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.
- 13.7 Принадлежности:
 - 13.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-А;
 - 13.7.2 Защитный кожух, в составе:
 - 13.7.2.1 Защитный кожух К-А – 1 шт.;
 - 13.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;
 - 13.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

14. ММХМ-1-Б, в составе:

- 14.1 Мойка медицинская хирургическая макси с одной чашей ММХМ-1-Б – 1 шт.;
- 14.2 Кронштейн – 1 шт.;
- 14.3 Винты М8х25 – 4 шт.;
- 14.4 Гайки М8 – 4 шт.;
- 14.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- 14.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.
- 14.7 Принадлежности:
 - 14.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-Б;
 - 14.7.2 Защитный кожух, в составе:
 - 14.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 1 шт.;
 - 14.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;
 - 14.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

15. ММХМ-1-В, в составе:

- 15.1 Мойка медицинская хирургическая макси с одной чашей ММХМ-1-В – 1 шт.;
- 15.2 Кронштейн – 1 шт.;
- 15.3 Винты М8х25 – 4 шт.;
- 15.4 Гайки М8 – 4 шт.;
- 15.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;
- 15.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.
- 15.7 Принадлежности:
 - 15.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-В;
 - 15.7.2 Защитный кожух, в составе:
 - 15.7.2.1 Защитный кожух К-В – 1 шт.;
 - 15.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;
 - 15.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

16. ММХМ-1-Г, в составе:

16.1 Мойка медицинская хирургическая макси с одной чашей ММХМ-1-Г – 1 шт.;

16.2 Кронштейн – 1 шт.;

16.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

16.4 Гайки М8 – 4 шт.;

16.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

16.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

16.7 Принадлежности:

16.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-Г;

16.7.2 Защитный кожух, в составе:

16.7.2.1 Защитный кожух К-Г – 1 шт.;

16.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

16.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

17. ММХМ-2-А, в составе:

17.1 Мойка медицинская хирургическая макси с двумя чашами ММХМ-2-А – 1 шт.;

17.2 Кронштейн – 2 шт.;

17.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

17.4 Гайки М8 – 8 шт.;

17.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

17.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

17.7 Принадлежности:

17.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-А;

17.7.2 Защитный кожух, в составе:

17.7.2.1 Защитный кожух К-А – 2 шт.;

17.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

17.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

18. ММХМ-2-Б, в составе:

18.1 Мойка медицинская хирургическая макси с двумя чашами ММХМ-2-Б – 1 шт.;

18.2 Кронштейн – 2 шт.;

18.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

18.4 Гайки М8 – 8 шт.;

18.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

18.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

18.7 Принадлежности:

18.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-Б;

18.7.2 Защитный кожух, в составе:

18.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 2 шт.;

18.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

18.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

19. ММХМ-2-В, в составе:

19.1 Мойка медицинская хирургическая макси с двумя чашами ММХМ-2-В – 1 шт.;

19.2 Кронштейн – 2 шт.;

19.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

19.4 Гайки М8 – 8 шт.;

19.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

19.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

19.7 Принадлежности:

19.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-В;

19.7.2 Защитный кожух, в составе:

19.7.2.1 Защитный кожух К-В – 2 шт.;

19.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

19.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

20. ММХМ-2-Г, в составе:

20.1 Мойка медицинская хирургическая макси с двумя чашами ММХМ-2-Г – 1 шт.;

20.2 Кронштейн – 2 шт.;

20.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

20.4 Гайки М8 – 8 шт.;

20.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

20.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

20.7 Принадлежности:

20.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-Г;

20.7.2 Защитный кожух, в составе:

20.7.2.1 Защитный кожух К-Г – 2 шт.;

20.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

20.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

21. ММХМ-3-А, в составе:

21.1 Мойка медицинская хирургическая макси с тремя чашами ММХМ-3-А – 1 шт.;

21.2 Кронштейн – 3 шт.;

21.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

21.4 Гайки М8 – 12 шт.;

21.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

21.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

21.7 Принадлежности:

21.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-А;

21.7.2 Защитный кожух, в составе:

21.7.2.1 Защитный кожух К-А – 3 шт.;

21.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

21.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

22. ММХМ-3-Б, в составе:

22.1 Мойка медицинская хирургическая макси с тремя чашами ММХМ-3-Б – 1 шт.;

22.2 Кронштейн – 3 шт.;

22.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

22.4 Гайки М8 – 12 шт.;

22.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

22.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

22.7 Принадлежности:

22.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-Б;

22.7.2 Защитный кожух, в составе:

22.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 3 шт.;

22.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

22.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

23. ММХМ-3-В, в составе:

23.1 Мойка медицинская хирургическая макси с тремя чашами ММХМ-3-В – 1 шт.;

23.2 Кронштейн – 3 шт.;

23.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

23.4 Гайки М8 – 12 шт.;

23.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

23.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

23.7 Принадлежности:

23.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-В;

23.7.2 Защитный кожух, в составе:

23.7.2.1 Защитный кожух К-В – 3 шт.;

23.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

23.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

24. ММХМ-3-Г, в составе:

24.1 Мойка медицинская хирургическая макси с тремя чашами ММХМ-3-Г – 1 шт.;

24.2 Кронштейн – 3 шт.;

24.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

24.4 Гайки М8 – 12 шт.;

24.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

24.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

24.7 Принадлежности:

24.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-Г;

24.7.2 Защитный кожух, в составе:

24.7.2.1 Защитный кожух К-Г – 3 шт.;

24.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

24.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

25. ММХС-1-А, в составе:

25.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с одной чашей ММХС-1-А – 1 шт.;

25.2 Кронштейн – 1 шт.;

25.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

25.4 Гайки М8 – 4 шт.;

25.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

25.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

25.7 Принадлежности:

25.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-А;

25.7.2 Защитный кожух, в составе:

25.7.2.1 Защитный кожух К-А – 1 шт.;

25.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

25.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

26. ММХС-1-Б, в составе:

26.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с одной чашей ММХС-1-Б – 1 шт.;

26.2 Кронштейн – 1 шт.;

26.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

26.4 Гайки М8 – 4 шт.;

26.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

26.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

26.7 Принадлежности:

26.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-Б;

26.7.2 Защитный кожух, в составе:

26.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 1 шт.;

26.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

26.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

27. ММХС-1-В, в составе:

27.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с одной чашей ММХС-1-В – 1 шт.;

27.2 Кронштейн – 1 шт.;

27.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

27.4 Гайки М8 – 4 шт.;

27.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

27.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

27.7 Принадлежности:

27.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-В;

27.7.2 Защитный кожух, в составе:

27.7.2.1 Защитный кожух К-В – 1 шт.;

27.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

27.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

28. ММХС-1-Г, в составе:

28.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с одной чашей ММХС-1-Г – 1 шт.;

28.2 Кронштейн – 1 шт.;

28.3 Винты М8х25 – 4 шт.;

28.4 Гайки М8 – 4 шт.;

28.5 Шайба плоская М8 – 4 шт.;

28.6 Заглушки ЗМ – 4 шт.

28.7 Принадлежности:

28.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-1-Г;

28.7.2 Защитный кожух, в составе:

28.7.2.1 Защитный кожух К-Г – 1 шт.;

28.7.2.2. Винты М6х16 – 3 шт.;

28.7.2.3 Заглушки ЗК – 3 шт.

29. ММХС-2-А, в составе:

29.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с двумя чашами ММХС-2-А – 1 шт.;

29.2 Кронштейн – 2 шт.;

29.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

29.4 Гайки М8 – 8 шт.;

29.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

29.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

29.7 Принадлежности:

29.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-А;

29.7.2 Защитный кожух, в составе:

29.7.2.1 Защитный кожух К-А – 2 шт.;

29.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

29.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

30. ММХС-2-Б, в составе:

30.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с двумя чашами ММХС-2-Б – 1 шт.;

30.2 Кронштейн – 2 шт.;

30.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

30.4 Гайки М8 – 8 шт.;

30.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

30.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

30.7 Принадлежности:

30.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-Б;

30.7.2 Защитный кожух, в составе:

30.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 2 шт.;

30.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

30.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

31. ММХС-2-В, в составе:

31.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с двумя чашами ММХС-2-В – 1 шт.;

31.2 Кронштейн – 2 шт.;

31.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

31.4 Гайки М8 – 8 шт.;

31.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

31.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

31.7 Принадлежности:

31.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-В;

31.7.2 Защитный кожух, в составе:

31.7.2.1 Защитный кожух К-В – 2 шт.;

31.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

31.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

32. ММХС-2-Г, в составе:

32.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с двумя чашами ММХС-2-Г – 1 шт.;

32.2 Кронштейн – 2 шт.;

32.3 Винты М8х25 – 8 шт.;

32.4 Гайки М8 – 8 шт.;

32.5 Шайба плоская М8 – 8 шт.;

32.6 Заглушки ЗМ – 8 шт.

32.7 Принадлежности:

32.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-2-Г;

32.7.2 Защитный кожух, в составе:

32.7.2.1 Защитный кожух К-Г – 2 шт.;

32.7.2.2. Винты М6х16 – 6 шт.;

32.7.2.3 Заглушки ЗК – 6 шт.

33. ММХС-3-А, в составе:

33.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с тремя чашами ММХС-3-А – 1 шт.;

33.2 Кронштейн – 3 шт.;

33.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

33.4 Гайки М8 – 12 шт.;

33.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

33.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

33.7 Принадлежности:

33.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-А;

33.7.2 Защитный кожух, в составе:

33.7.2.1 Защитный кожух К-А – 3 шт.;

33.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

33.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

34. ММХС-3-Б, в составе:

34.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с тремя чашами ММХС-3-Б – 1 шт.;

34.2 Кронштейн – 3 шт.;

34.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

34.4 Гайки М8 – 12 шт.;

34.5 Шайба плоская М8 – 12шт.;

34.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

34.7 Принадлежности:

34.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-Б;

34.7.2 Защитный кожух, в составе:

34.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 3 шт.;

34.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

34.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

35. ММХС-3-В, в составе:

35.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с тремя чашами ММХС-3-В – 1 шт.;

35.2 Кронштейн – 3 шт.;

35.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

35.4 Гайки М8 – 12 шт.;

35.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

35.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

35.7 Принадлежности:

35.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-В;

35.7.2 Защитный кожух, в составе:

35.7.2.1 Защитный кожух К-В – 3 шт.;

35.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

35.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

36. ММХС-3-Г, в составе:

36.1 Мойка медицинская хирургическая стандарт с тремя чашами ММХС-3-Г – 1 шт.;

36.2 Кронштейн – 3 шт.;

36.3 Винты М8х25 – 12 шт.;

36.4 Гайки М8 – 12 шт.;

36.5 Шайба плоская М8 – 12 шт.;

36.6 Заглушки ЗМ – 12 шт.

36.7 Принадлежности:

36.7.1 Стеновая панель, варианты исполнения: С-3-Г;

36.7.2 Защитный кожух, в составе:

36.7.2.1 Защитный кожух К-Б – 3 шт.;

36.7.2.2. Винты М6х16 – 9 шт.;

36.7.2.3 Заглушки ЗК – 9 шт.

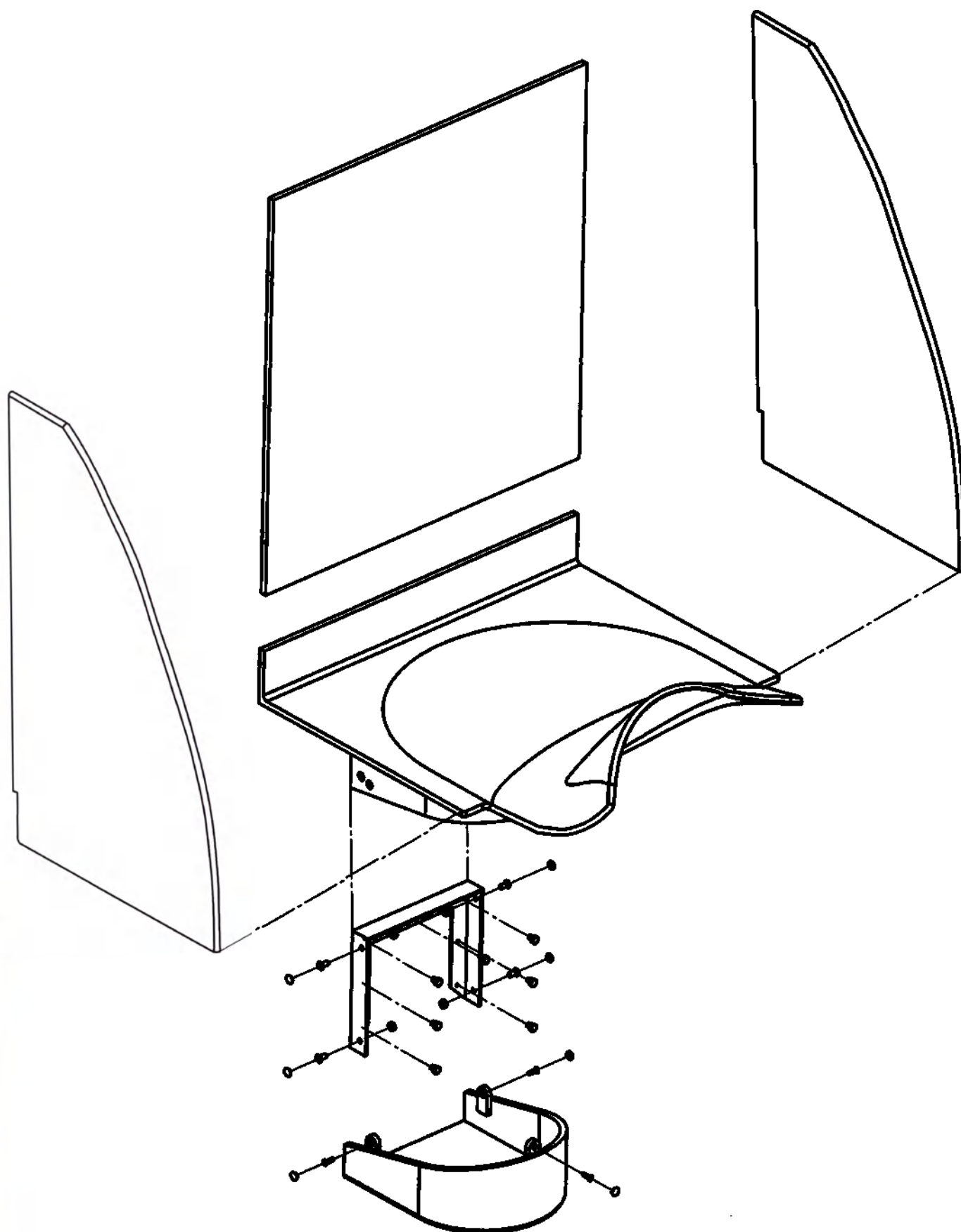


Рисунок 1 – Монтажный чертеж мойки медицинской хирургической для исполнений ММХГ-1-А, ММХГ-1-Б, ММХГ-1-В, ММХГ-1-Г

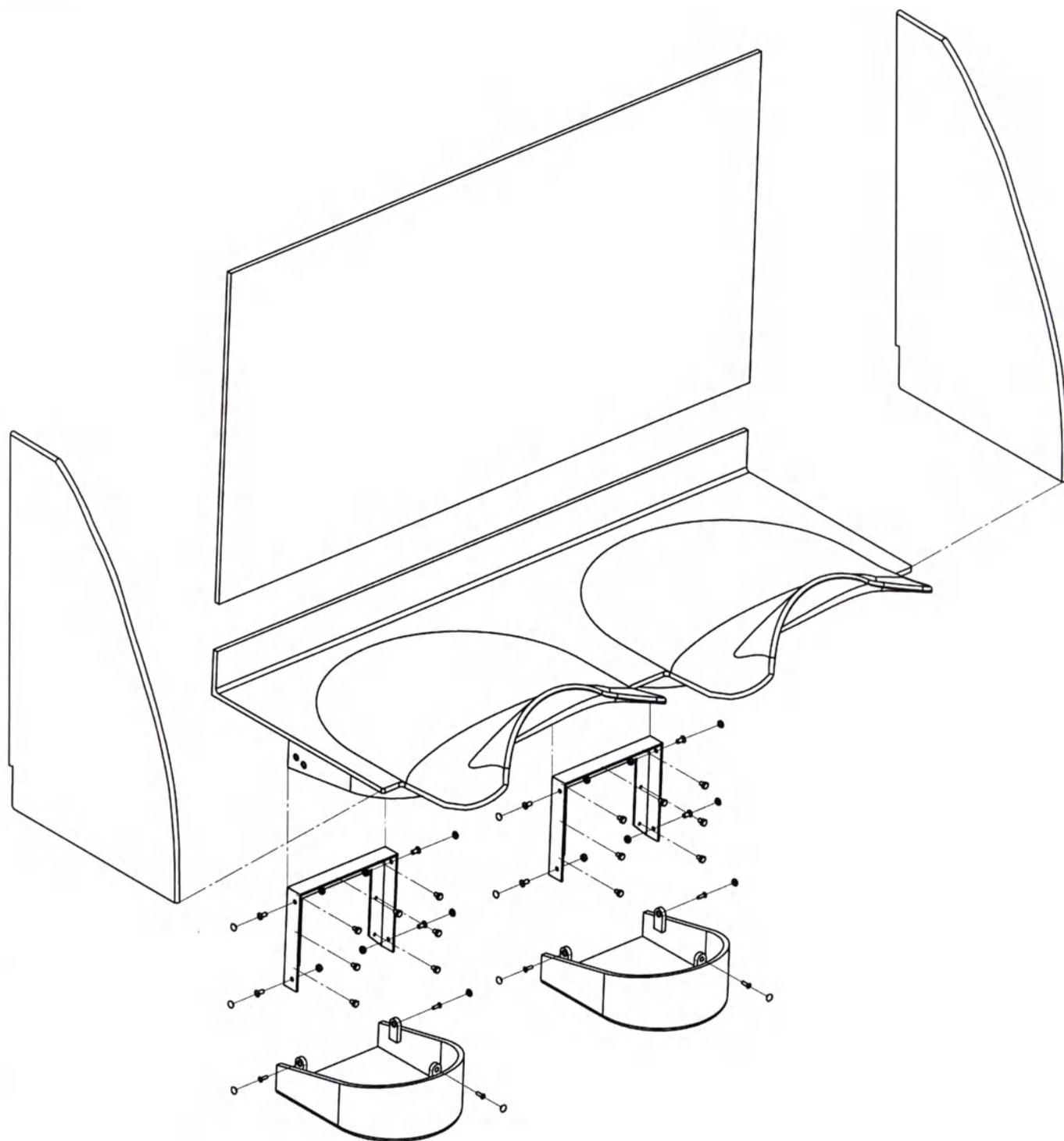
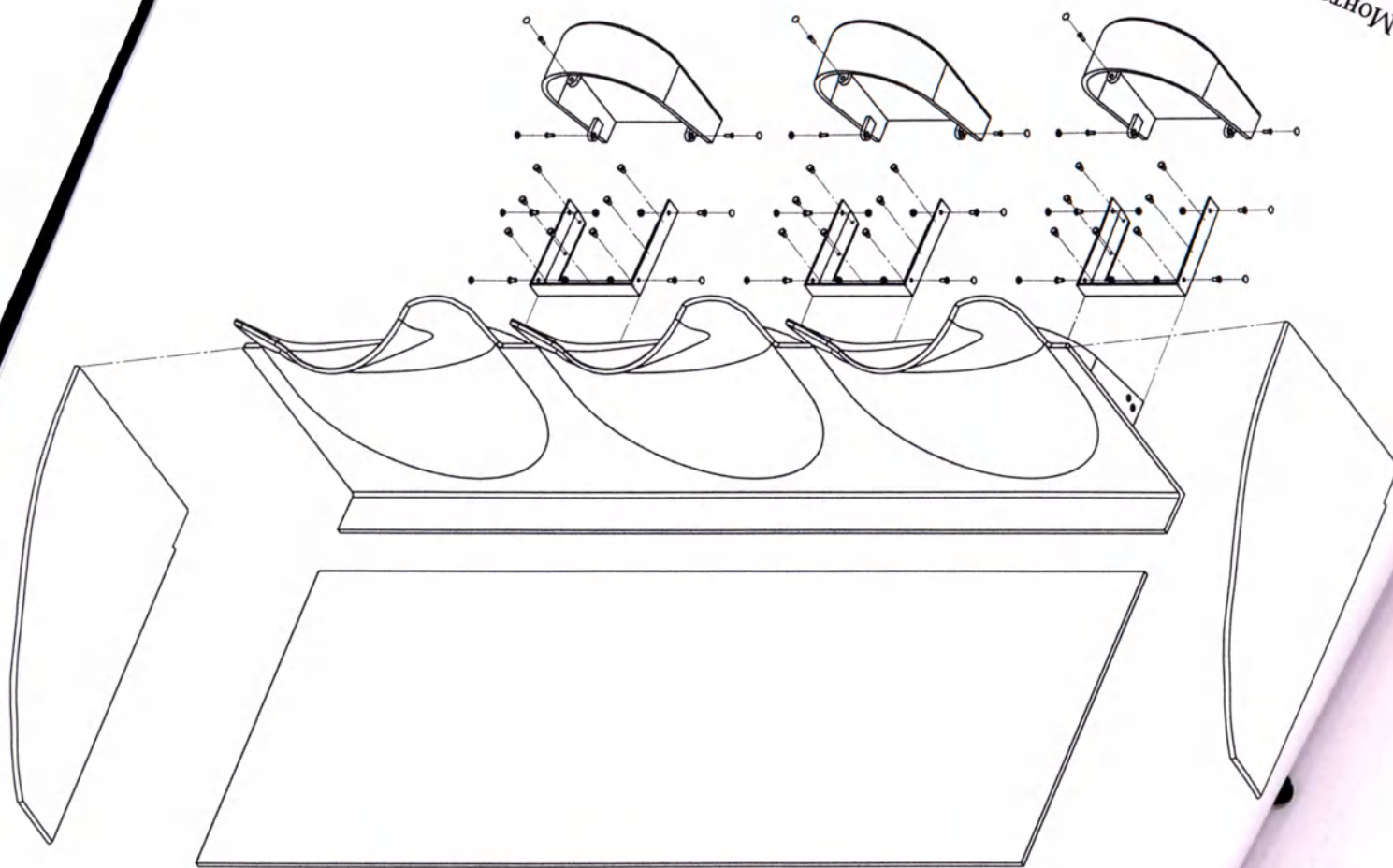


Рисунок 2 – Монтажный чертеж мойки медицинской хирургической для исполнений ММХГ-2-А, ММХГ-2-Б, ММХГ-2-В, ММХГ-2-Г

Рисунок 3 – Монтажный чертеж мойки медицинский хирургической для исполнения ММХТ-3-А, ММХТ-3-Б, ММХТ-3-В, ММХТ-3-Г



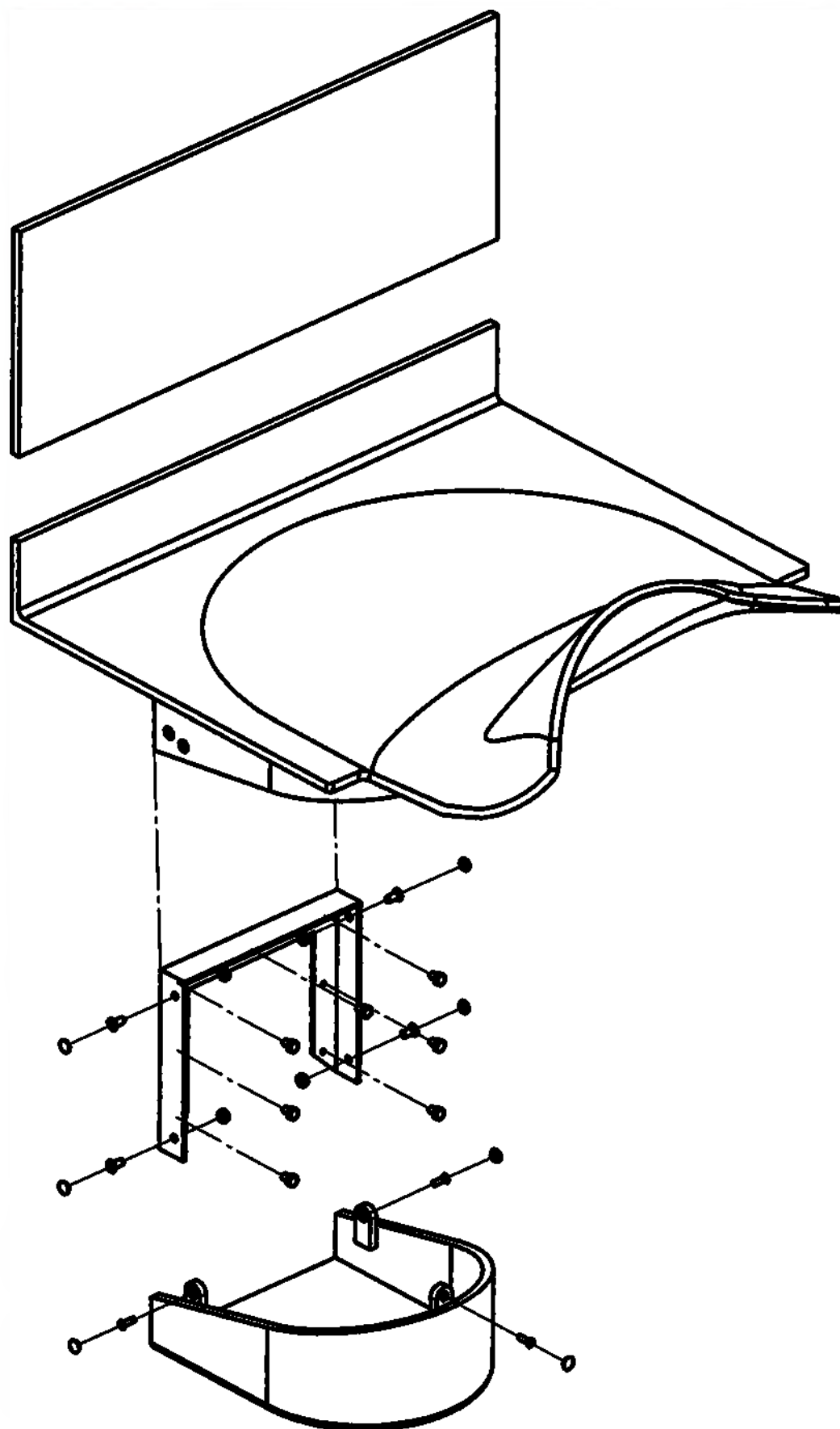


Рисунок 4 – Монтажный чертеж мойки медицинской хирургической для исполнений ММХМ-1-А, ММХМ-1-Б, ММХМ-1-В, ММХМ-1-Г, ММХС-1-А, ММХС-1-Б, ММХС-1-В, ММХС-1-Г

Рисунок 5 – Монтажный чертеж мойки медицинкой хирургической для исполнения ММХМ-2-А, ММХМ-2-Б, ММХМ-2-Г, ММХМ-2-В, ММХС-2-А, ММХС-2-Б, ММХС-2-Г, ММХС-2-В


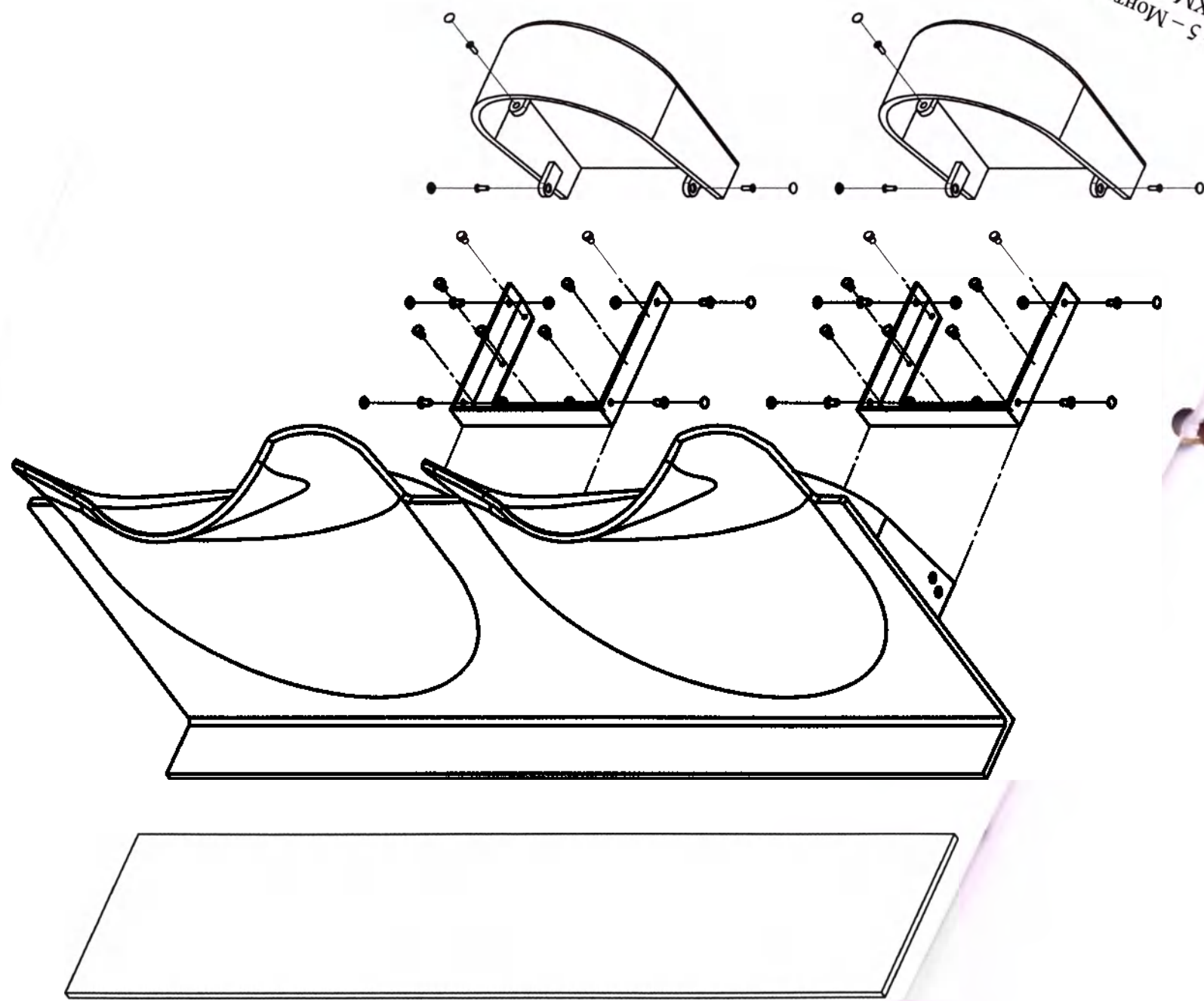


Рисунок 6 – Монтажный чертеж мойки медицинкой хирургической маски для исполнений
 ММХМ-3-А, ММХМ-3-Б, ММХМ-3-Г, ММХС-3-А, ММХС-3-Б, ММХС-3-В, ММХС-3-Г, ММХС-3-Д, ММХС-3-Е, ММХС-3-В, ММХС-3-З, ММХС-3-И, ММХС-3-К, ММХС-3-Л, ММХС-3-М, ММХС-3-Н, ММХС-3-О, ММХС-3-П, ММХС-3-Р, ММХС-3-С, ММХС-3-Т, ММХС-3-У, ММХС-3-Ф, ММХС-3-Х, ММХС-3-Ц, ММХС-3-Ч, ММХС-3-Ш, ММХС-3-Щ, ММХС-3-Ъ, ММХС-3-Ы, ММХС-3-Ь, ММХС-3-Э, ММХС-3-Ю, ММХС-3-Я

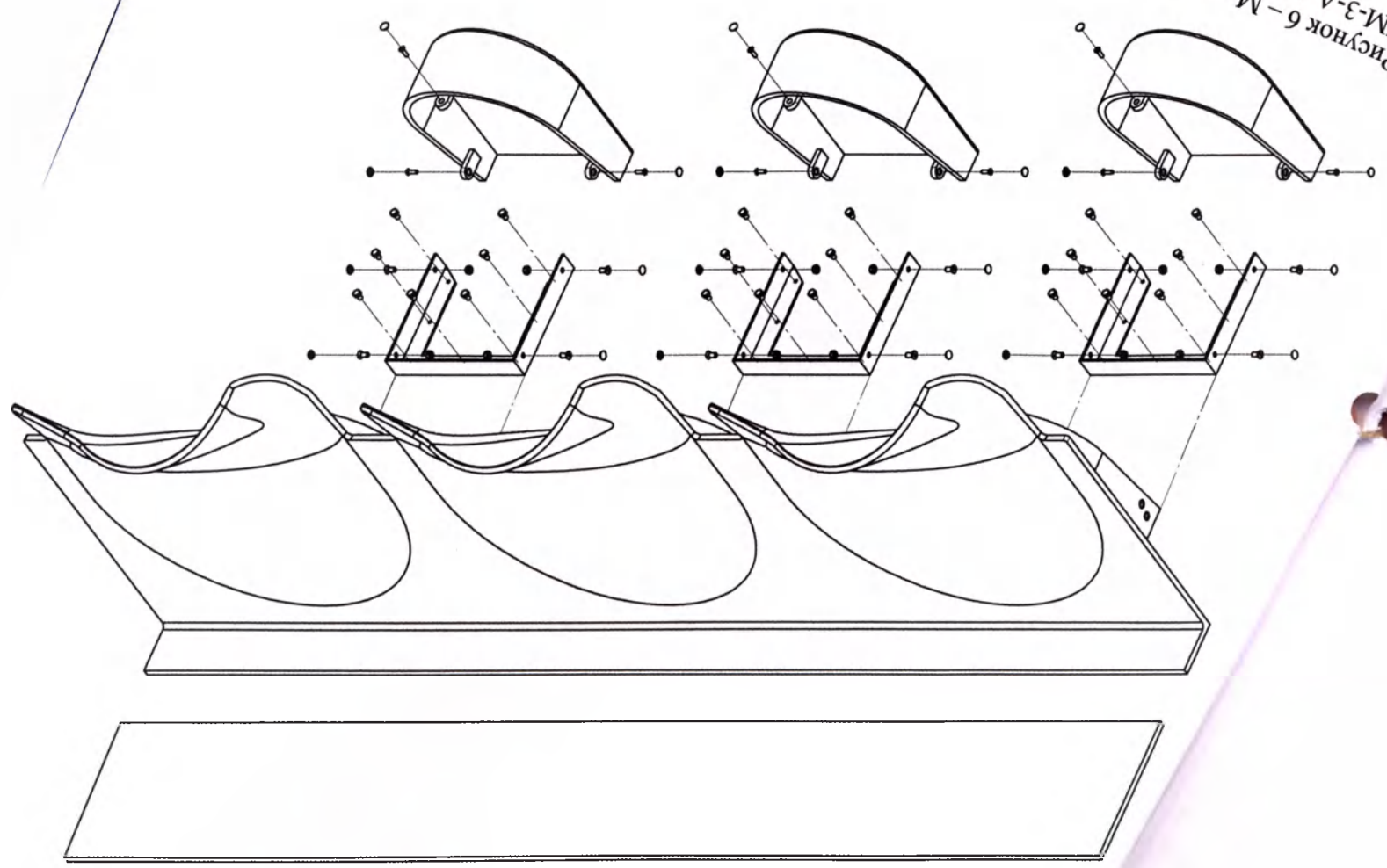

ООО «Сторм-СПБ»
Итого в настоящем документе

24 _____ листа (ов)

Директор
Куц В.А.

