

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Витамин Продукт»

Сурков А.В.



09 20 24 г.

Фотоматериалы

медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023



Рис. 1 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, общий вид



Рис. 2 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению

МОРЕ НОРМ

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ



ФОРТЕ

КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ
СОЛИ 21 Г/Л

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

АЭРОЗОЛЬ e 150 мл

**Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл**
Для взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения
полости носа без травматизации слизистой, для
разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления
корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой
оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для
детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия,
656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка,
ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:**
656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.

Претензии потребителей принимаются по адресу
фирмы-изготовителя.

e 150 мл




Дата изготовления:

Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

CMYK

 **Pantone 285 C**

Рис. 3 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



CMYK

Pantone 285 C

Рис. 4 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «MORE NORM ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 5 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, общий вид

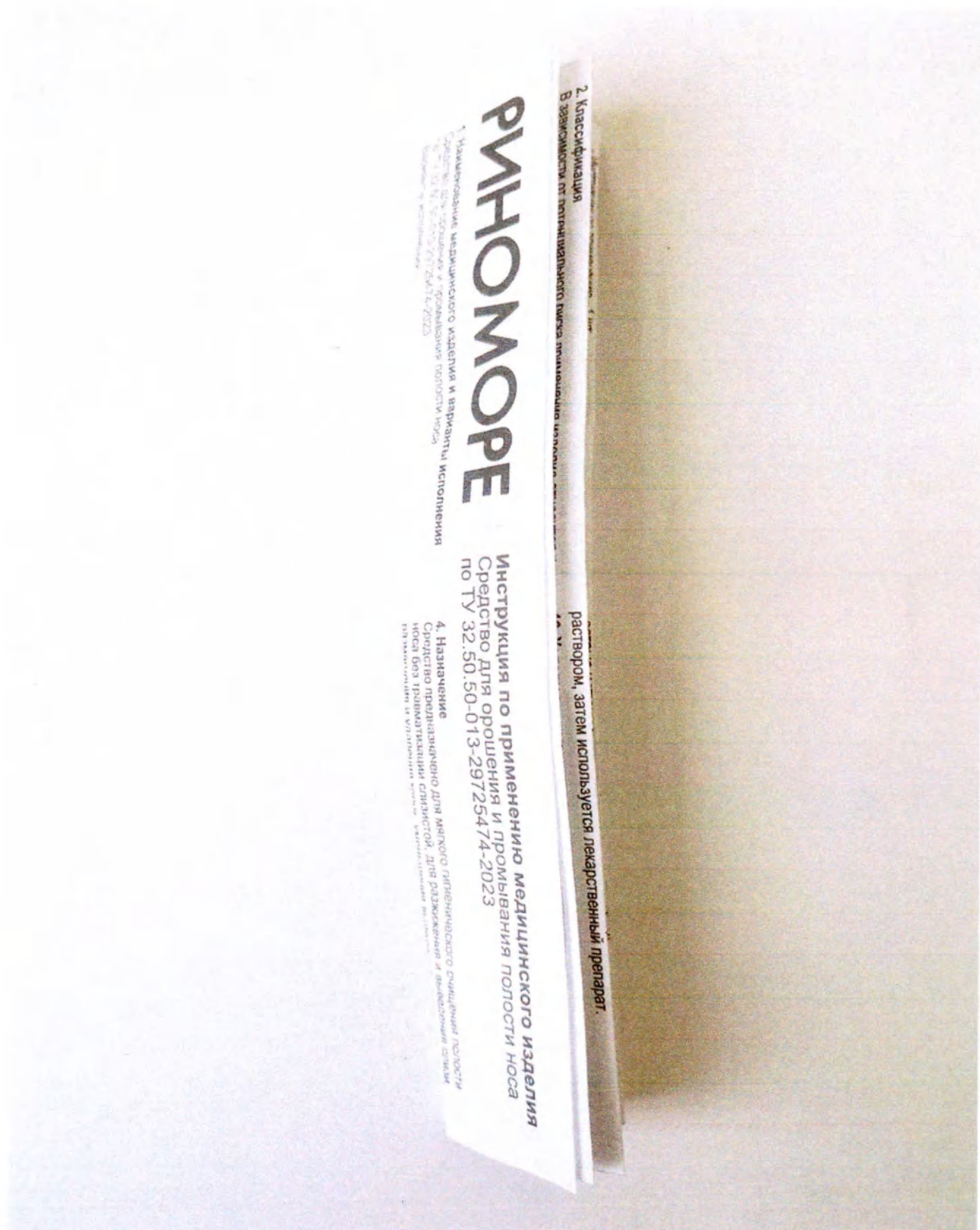


Рис. 6 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению



АЭРОЗОЛЬ

РИНО МОРЕ

УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА
ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ



21 ФОРТЕ
г/л КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ

€ 150 мл

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл
Для взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения
полости носа без травматизации слизистой, для
разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления
корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой
оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для
детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия,
656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка,
ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:**
656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.

Тел.: 8 (3852) 37-96-91.

www.vitam.pro.

Претензии потребителей принимаются по адресу
фирмы-изготовителя.

е 150 мл



Дата изготовления:

Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

CMYK



Pantone 306 C



Pantone 219 C

Рис. 7 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 8 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 9 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия...

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ»

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления корочек, увлажнение слизистой.

Рис. 10 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению

РИНО МОРЕ

ФОРТЕ

УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА
ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

21
г/л

КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ

150 мл

**Средство для орошения
и промывания полости носа**
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл
Для взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения
полости носа без травматизации слизистой, для
разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления
корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой
оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для
детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия,
656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка,
ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:**
656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91. www.vitam.pro.

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ: ООО «ЗдравСтандарт»,
www.z-std.ru, sales@z-std.ru.

Претензии потребителей принимаются по адресу
фирмы-изготовителя.

е 150 мл

Дата изготовления:

Партия:

NON
STERILE

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

СМΥΚ

 **Pantone 306 C**

 **Pantone 219 C**

Рис. 11 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 12 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 13 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение
Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для разжижения и выведения слизи, снижения

Рис. 14 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 812 C
CMYK



Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл

Для взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.

Тел.: 8 (3852) 37-96-91.

www.vitam.pro.

Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

е 150 мл



Дата изготовления:

Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 15 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки

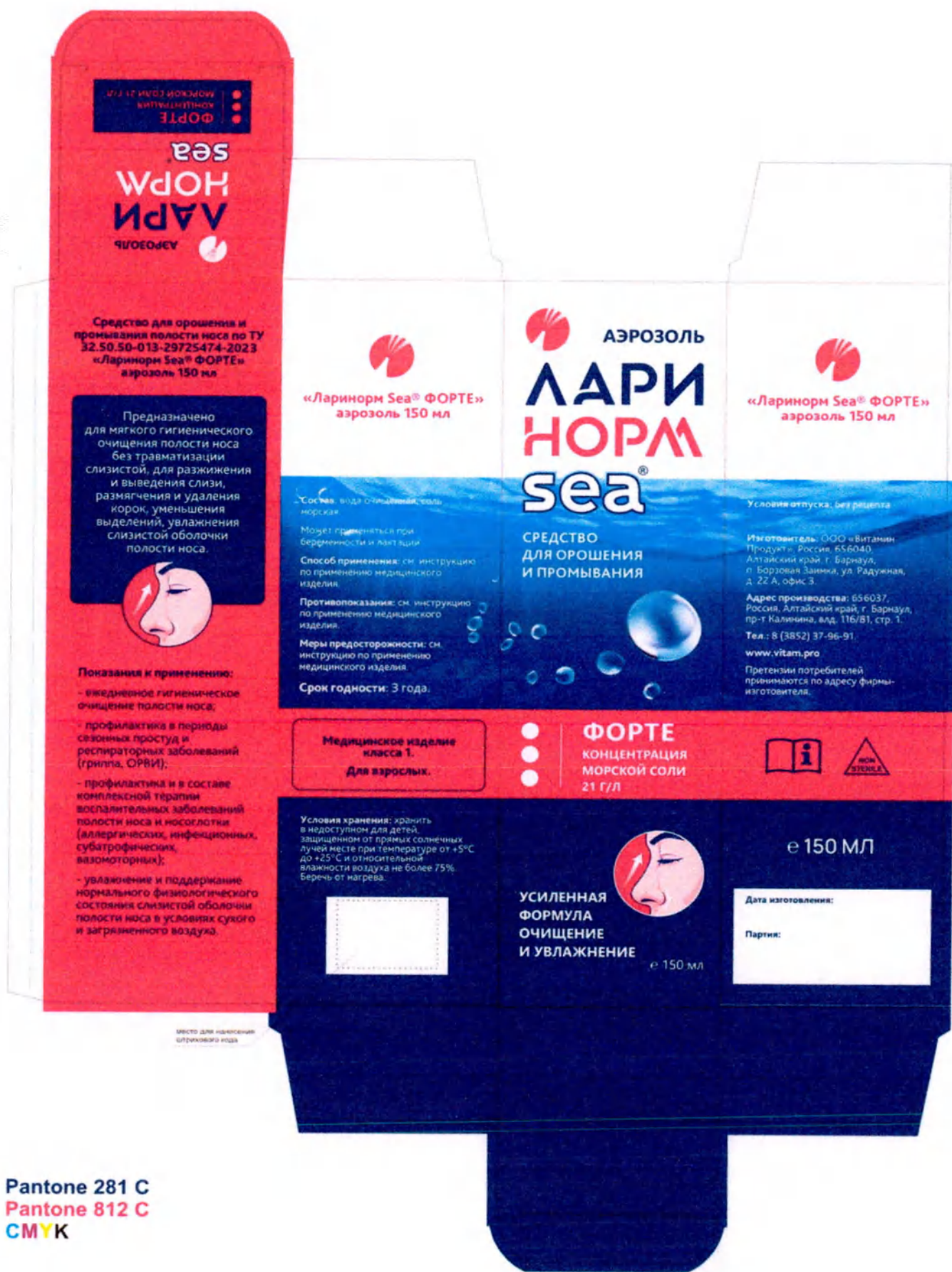


Рис. 16 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 17 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
Варианты исполнения

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, аллергенов и удаления пыли, увлажнение слизистой оболочки.

Рис. 18 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению



СМУК

 Pantone 306 C

 Pantone 219 C

Рис. 19 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 20 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 21 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия...

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
Варианты исполнения

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, отека слизистой и улучшения дыхания.

Рис. 22 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению



место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

CMYK

 Pantone 306 C

 Pantone 219 C

Рис. 23 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 24 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 25 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение
Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистых для потягивания и выведения слизи, размяг-

Рис. 26 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 812 C
CMYK



АЭРОЗОЛЬ

ЛАРИНОРМ sea®

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

ФОРТЕ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ
21 г/л

УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА
ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

е 50 мл

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл

Для взрослых.
Предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой оболочки полости носа.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская. Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1. **Тел.:** 8 (3852) 37-96-91. www.vitam.pro. Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

е 50 мл

Дата изготовления:

Партия:




место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 27 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
 «Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки




Pantone 281 C
Pantone 812 C
CMYK

Рис. 28 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 29 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, общий вид

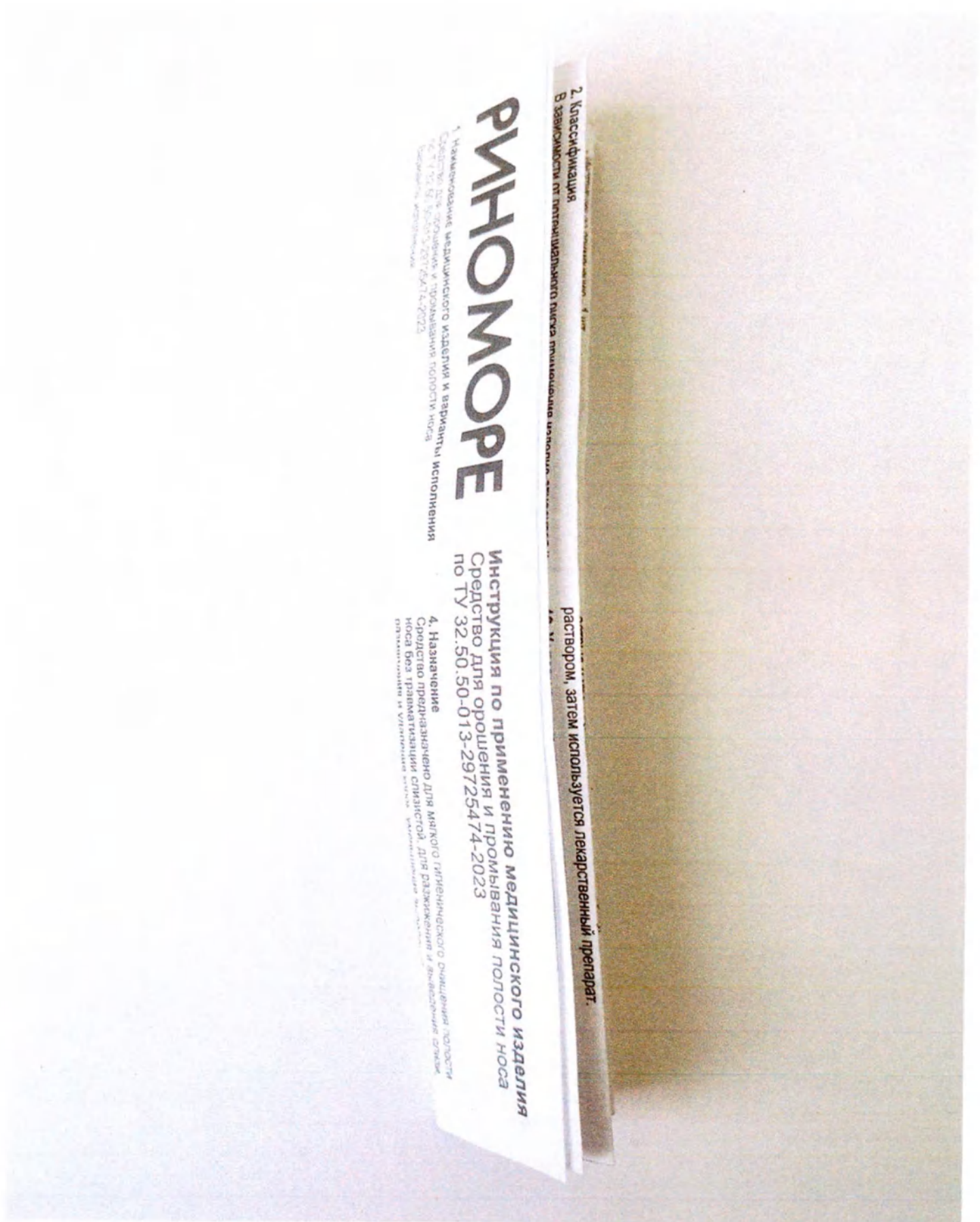

РИНОМОРЕ

1. Назначение медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение
Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости
носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи,
предназначенной к удалению из полости носа.

2. Классификация
В зависимости от потенциального риска продукции использования

раствором, затем используется лекарственный препарат.

Рис. 30 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, инструкция по применению

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.
Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

СМUK

Pantone 306 C

Pantone 219 C

Рис. 31 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 32 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 33 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для разжижения и выведения слизи, слизи.

Рис. 34 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 2727 C
CMYK

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
Продукт», Россия, 656040,
Алтайский край, г. Барнаул,
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
д. 22 А, офис 3.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037,
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.
Петензии потребителей
принимаются по адресу фирмы-
изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 35 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 36 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 100 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 37 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, общий вид

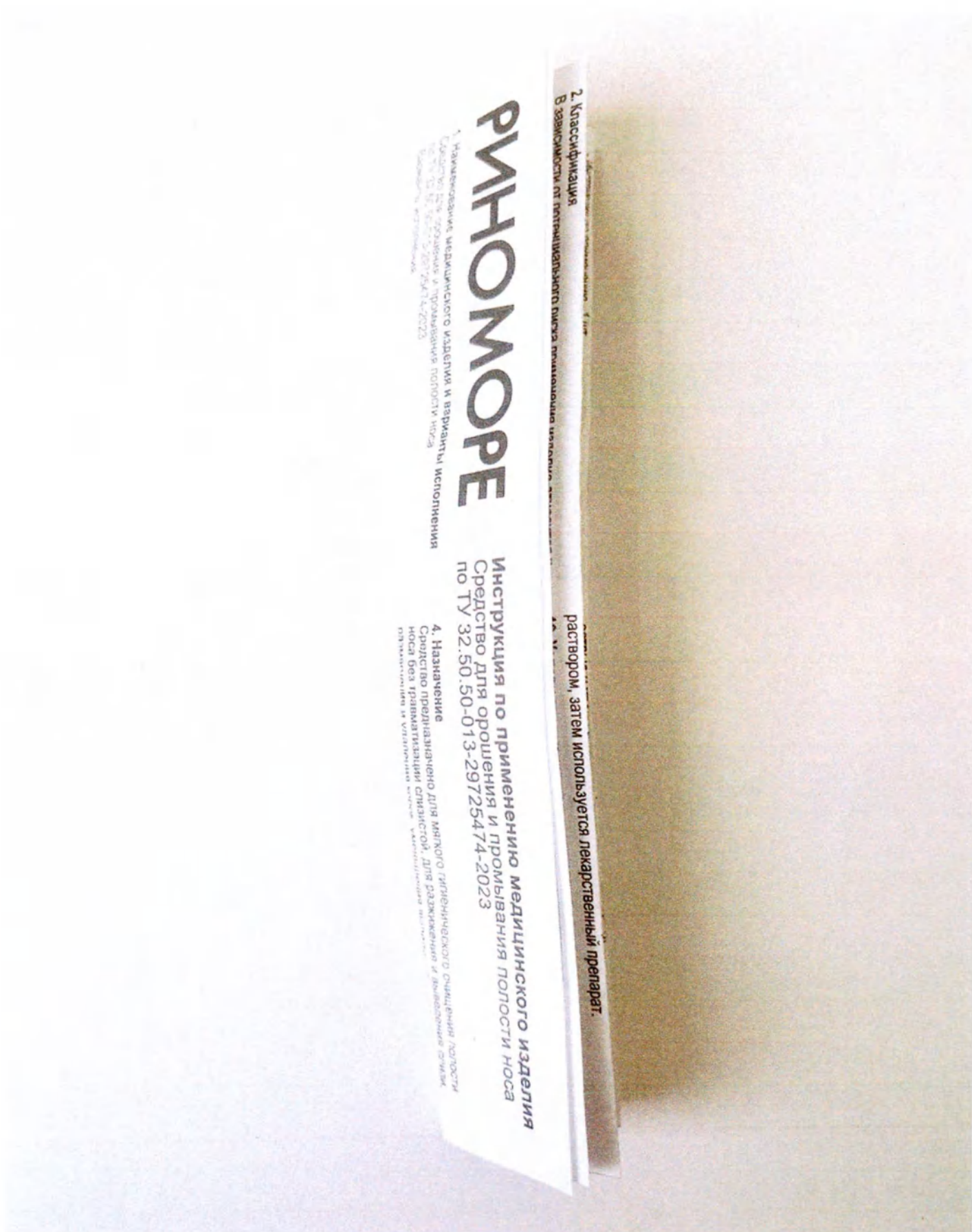


Рис. 38 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, инструкция по применению

CMYK



Pantone 306 C



Pantone 219 C

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-
2023 «РИНОМОРЕ ФОРТЕ»
спрей назальный 50 мл
Для взрослых СОСТАВ: вода
опищенная, соль морская
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см.
инструкцию по применению
медицинского изделия
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
в недоступном для детей,
защищенном от прямых солнечных
лучей месте при температуре
от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%.
Бережно от нагрева

СРОК ГОДНОСТИ:
3 года
+ 50 мл

НАЗАЛЬНЫЙ
СПРЕЙ

РИНОМОРЕ

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

21 ФОРТЕ
г/л
КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
Продукт», Россия, 656040,
Алтайский край, г. Барнаул,
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
д. 22 А, офис 3. АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 656037, Россия,
Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro. Претензии
потребителей принимаются
по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 39 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки

CMYK

Pantone 306 C

Pantone 219 C

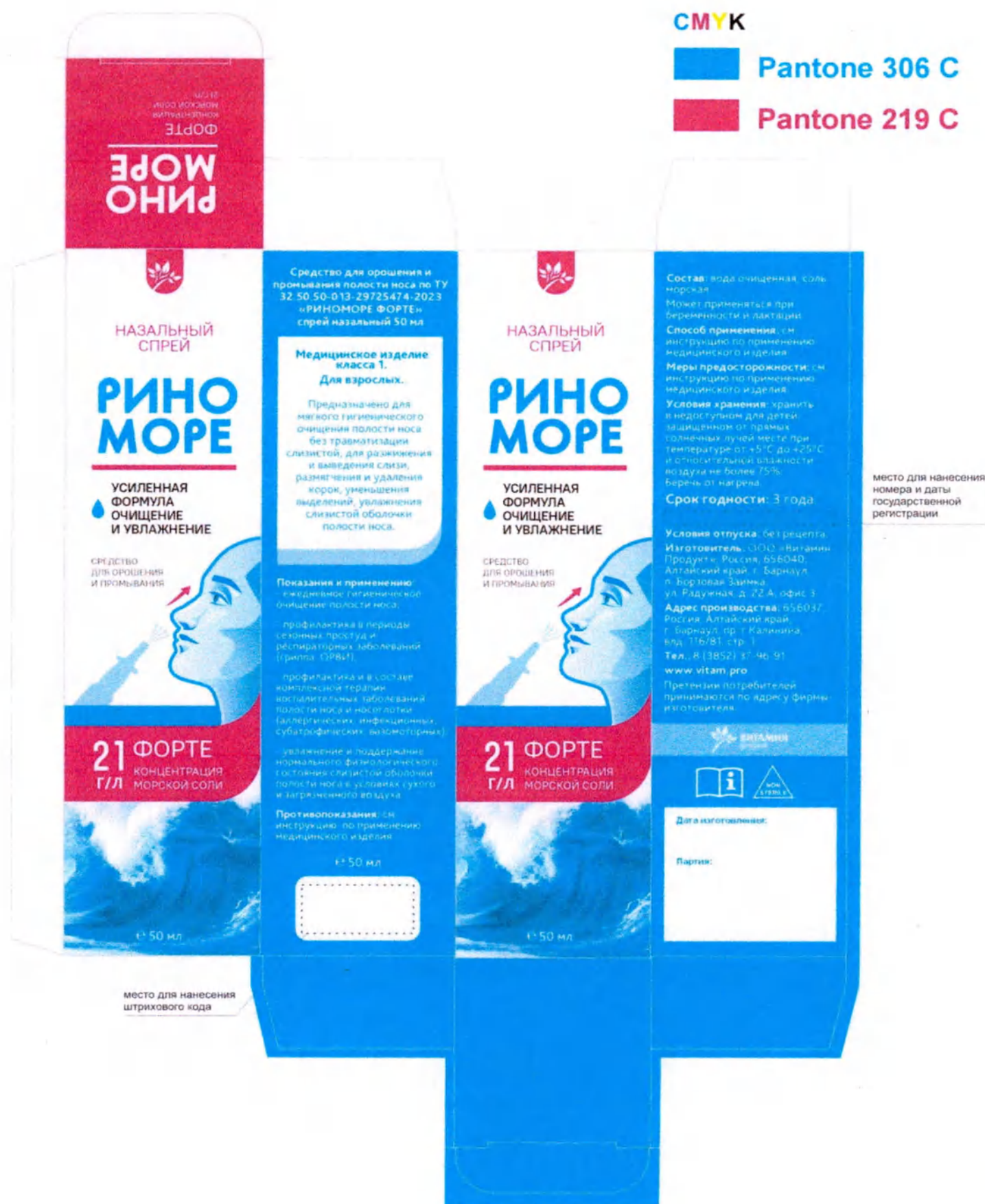


Рис. 40 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 41 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для патоженоза и выделения слизи, размяг-

Рис. 42 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 2727 C
CMYK

Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл

Для взрослых.
СОСТАВ: вода очищенная, соль морская. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года

50 мл

Форте

ЛАРИНОРМ sea®

Средство для орошения и промывания

Усиленная формула
очистление и увлажнение

КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ
21 г/л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1. Тел.: 8 (3852) 37-96-91. www.vitam.pro. Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 43 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки

Pantone 281 C
Pantone 2727 C
CMYK



Рис. 44 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® ФОРТЕ» спрей назальный 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 45 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ СОФТ» аэрозоль 150 мл, общий вид



Рис. 46 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ СОФТ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению

МОРЕ НОРМ

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ



СОФТ

КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ
СОЛИ 11 Г/Л

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

АЭРОЗОЛЬ e 150 МЛ

**Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ СОФТ» аэрозоль 150 мл**
Для детей с 6 месяцев и взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения
полости носа без травматизации слизистой, для
разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления
корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой
оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для
детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия,
656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка,
ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:**
656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.

Претензии потребителей принимаются по адресу
фирмы-изготовителя.

e 150 мл



Дата изготовления:



Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

CMYK

Pantone 285 C

Рис. 47 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 48 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «МОРЕ НОРМ СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 49 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
Варианты исполнения

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, плазматического и клеточного содержимого воспалительного процесса.

Рис. 50 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению



CMYK

 Pantone 7710 C

 Pantone 1505 C


Рис. 51 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 52 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 53 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, общий вид

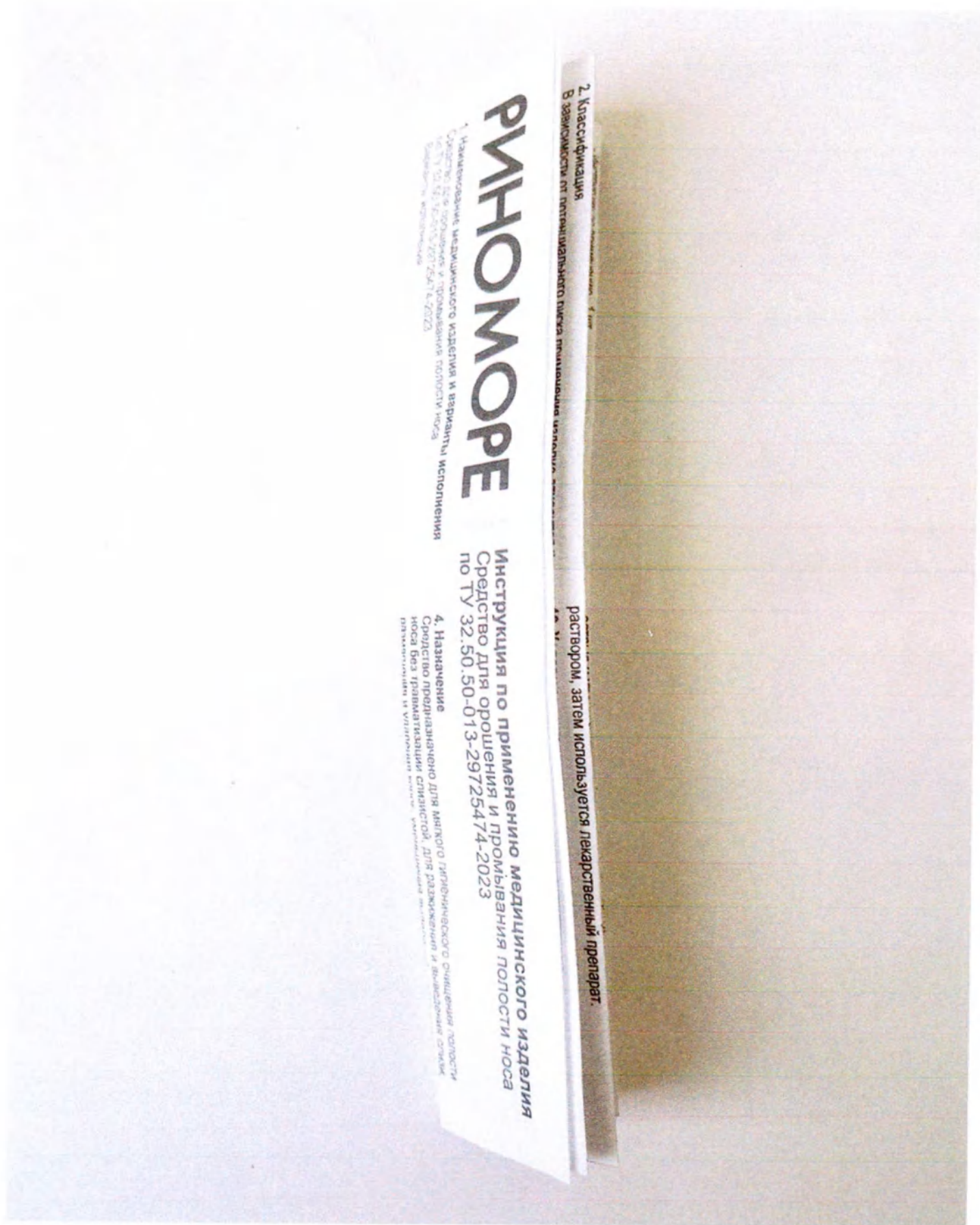

РИНОМОРЕ

Назначение: медицинское изделие и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение
Средство предназначено для мягкого гидротического очищения полости
носа без травмирования слизистой, для разжижения и выведения слизи,
раздражающих и воспалительных процессов, вызывающих воспаление.

2. Классификация
В зависимости от потенциального риска применения изделия

раствором, затем используется лекарственный препарат.

Рис. 54 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению



CMYK

Pantone 7710 C

Pantone 1505 C

Рис. 55 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 56 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 57 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 150 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для отложения и выведения слизи, размяг-

Рис. 58 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone Hexachrome Orange C
CMYK



Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 150 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.

Тел.: 8 (3852) 37-96-91.

www.vitam.pro.

Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

е 150 мл



Дата изготовления:

Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 59 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Pantone 281 C
Pantone Hexachrome Orange C
CMYK

Рис. 60 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 61 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, общий вид

2. Классификация
В зависимости от потенциального риска применения изделия

РИНОМОРЕ

Наименование, медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение
Средство предназначено для местного гигиенического очищения полости
носа без травматизации слизистых, для разжижения и выведения слизи,
размягчения и удаления корочек, увлажнение слизистой оболочки.

раствором, затем используется лекарственный препарат.

Рис. 62 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению



СМУК

 Pantone 7710 C

 Pantone 1505 C

Рис. 63 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 64 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 65 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, общий вид



Рис. 66 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению



CMYK

 Pantone 7710 C

 Pantone 1505 C

Рис. 67 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 68 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ СОФТ» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 69 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 50 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травмирования слизистой, для разжижения и выведения слизи, размяг-

Рис. 70 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C

Pantone Hexachrome Orange C

CMYK

АЭРОЗОЛЬ

ЛАРИНОРМ sea®

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

СОФТ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ
11 г/л

МЯГКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

е 50 мл

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 50 мл

Для детей с 6 месяцев и взрослых.
Предназначено для мягкого гигиенического
очистки полости носа без травматизации
слизистой, для разжижения и выведения слизи,
размягчения и удаления корок, уменьшения
выделений, увлажнения слизистой оболочки
полости носа.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.
Может применяться при беременности и лактации.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** см. инструкцию
по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном
для детей, защищенном от прямых солнечных лучей
месте при температуре от +5°C до +25°C
и относительной влажности воздуха не более 75%.
Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия,
656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая
Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91. www.vitam.pro.
Претензии потребителей принимаются по адресу
фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:

Партия:

е 50 мл

NON STERILE

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 71 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 72 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 73 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 100 мл, общий вид

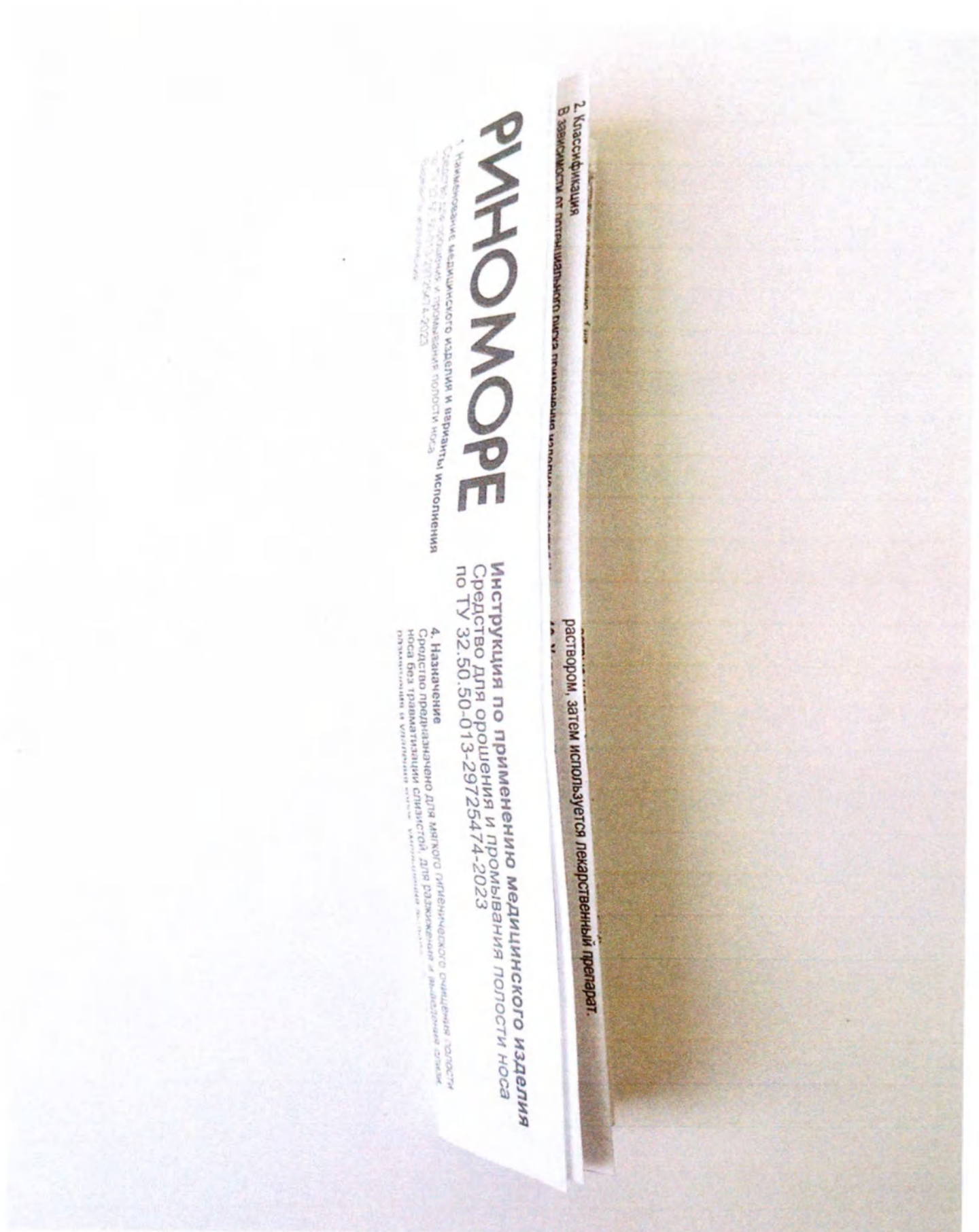


Рис. 74 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 100 мл, инструкция по применению

 **Pantone 7710 C**

 **Pantone 1505 C**

CMYK

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации



Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ»
спрей назальный 100 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых
СОСТАВ: вода очищенная, соль
морская.
**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** см.
инструкцию по применению
медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
в недоступном для детей, защищенном
от прямых солнечных лучей месте при
температуре от +5°C до +25°C и
относительной влажности воздуха не
более 75%. Беречь от нагрева.

  **СРОК ГОДНОСТИ:**
3 года
100 мл

РИНОМОРЕ
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

11 СОФТ
г/л КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
Продукт», Россия, 656040,
Алтайский край, г. Барнаул,
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
д. 22 А, офис 3.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037,
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.
Претензии потребителей
принимаются по адресу фирмы-
изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 75 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 100 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 76 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 100 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 77 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» спрей назальный 100 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023


Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистых для разжижения и выведения слизи, размяг-

Рис. 78 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФГ» спрей назальный 100 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 320 C
CMYK

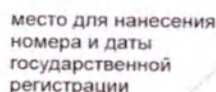

Дата изготовления:
Партия:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рис. 80 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® СОФТ» спрей назальный 100 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 81 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 50 мл, общий вид

РИНОМОРЕ

Назначение: медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение
Средство предназначено для местного гипертонического орошения полости
носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи
при воспалении и отеке слизистой оболочки.

2. Классификация
В зависимости от потенциального риска применения изделия

раствором, затем используется лекарственный препарат.

Рис. 82 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 50 мл, инструкция по применению

 **Pantone 7710 C**

 **Pantone 1505 C**

CMYK

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-
2023 «РИНОМОРЕ СОФТ»
спрей назальный 50 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых
СОСТАВ: вода очищенная, соль
морская. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**
см. инструкцию по применению
медицинского изделия
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
в недоступном для детей
защищенном от прямых солнечных
лучей месте при температуре
от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%.
Беречь от нагрева.

 **СРОК ГОДНОСТИ:**
3 года

 **11** **СОФТ**
г/л КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ

**НАЗАЛЬНЫЙ
СПРЕЙ**

РИНОМОРЕ

**МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ**

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
Продукт», Россия, 656040,
Алтайский край, г. Барнаул,
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
д. 22 А, офис 3. **АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия,
Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro. Претензии
потребителей принимаются
по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 83 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ СОФТ» спрей назальный 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки

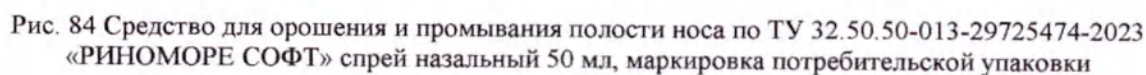




Рис. 85 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» спрей назальный 50 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для разжижения и выведения слизи, отека,

Рис. 86 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® СОФТ» спрей назальный 50 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 320 C
CMYK

место для нанесения
 номера и даты
 государственной
 регистрации

Средство для орошения
 и промывания полости носа по ТУ
 32.50.50-013-29725474-2023
 «Ларинорм Sea® СОФТ»
 спрей назальный 50 мл

Для детей с 6 месяцев и взрослых.
СОСТАВ: вода очищенная, соль
 морская. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 см. инструкцию по применению
 медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
 в недоступном для детей,
 защищенном от прямых солнечных
 лучей месте при температуре
 от +5°C до +25°C и относительной
 влажности воздуха не более 75%.
 Беречь от нагрева

СРОК ГОДНОСТИ:
 3 года. **e 50 мл**

Софт

ЛАРИНОРМ
sea®

Средство для орошения и промывания

*Мягкое очищение
 и увлажнение*

**КОНЦЕНТРАЦИЯ
 МОРСКОЙ СОЛИ**
11 г/л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
 Продукт», Россия, 656040,
 Алтайский край, г. Барнаул,
 п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
 д. 22 А, офис 3. **АДРЕС**
ПРОИЗВОДСТВА: 656037, Россия,
 Алтайский край, г. Барнаул,
 пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro. Претензии
 потребителей принимаются
 по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 87 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
 «Ларинорм Sea® СОФТ» спрей назальный 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки

Pantone 281 C
Pantone 320 C
CMYK



Рис. 88 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® СОФТ» спрей назальный 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 89 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, общий вид

МОРЕ НОРМ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

8. Свойства медицинского изделия

- вымывает из полости носа слизь, пылевые частицы, пыльцу

улучшает носовое дыхание,
орошая и промывая ее.

Рис. 90 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению



Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«МОРЕ НОРМ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых.
 Предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой оболочки полости носа.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.
СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.
 Может применяться при беременности и лактации.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.
 Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

е 150 мл



Дата изготовления:



Партия:

место для нанесения
 номера и даты
 государственной
 регистрации

CMYK

 **Pantone 285 C**

Рис. 91 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
 «МОРЕ НОРМ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 92 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«MORE NORM БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 93 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия...

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
Баллончик с распылителем

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и увлажнения корок, увлажнение слизистой оболочки.

Рис. 94 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению



CMYK

 Pantone 2172 C

 Pantone 2287 C

Рис. 95 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 96 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 97 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, общий вид

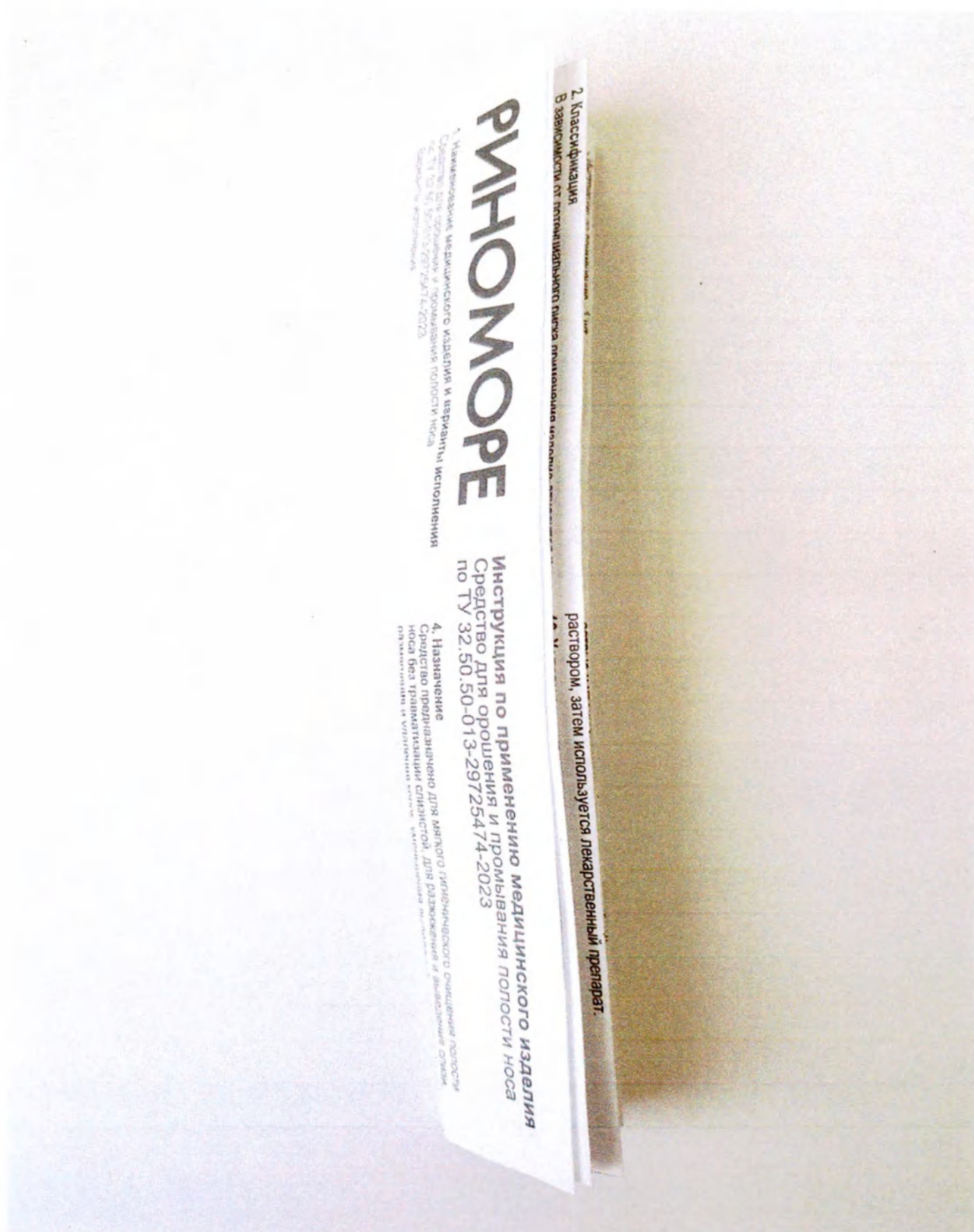


Рис. 98 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению



CMYK

 **Pantone 2172 C**

 **Pantone 2287 C**

Рис. 99 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 100 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 101 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размяг-

Рис. 102 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 3405 C
CMYK



АЭРОЗОЛЬ

ЛАРИ НОРМ sea®

СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ



● БАЛАНС
○ КОНЦЕНТРАЦИЯ
○ МОРСКОЙ СОЛИ
○ 9 г/л

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГИГИЕНА
И УВЛАЖНЕНИЕ



е 150 мл

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 150 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых.

Предназначено для мягкого гигиенического очищения
полости носа без травматизации слизистой, для
разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления
корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой
оболочки полости носа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская.

Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для
детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте
при температуре от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия,
656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка,
ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:**
656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.

Претензии потребителей принимаются по адресу
фирмы-изготовителя.

е 150 мл



Дата изготовления:
Партия:

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 103 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка индивидуальной упаковки

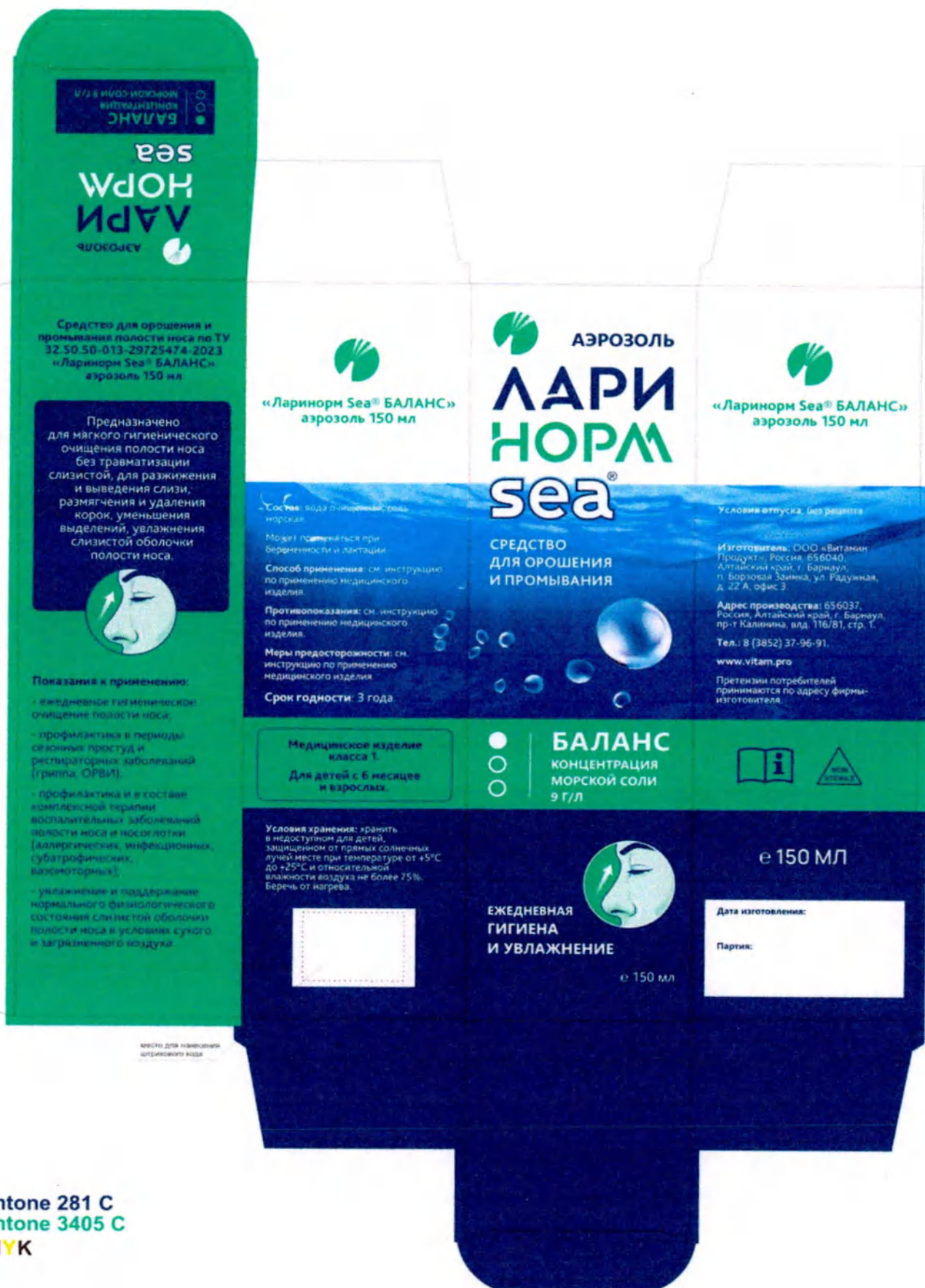


Рис. 104 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 150 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 105 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, общий вид

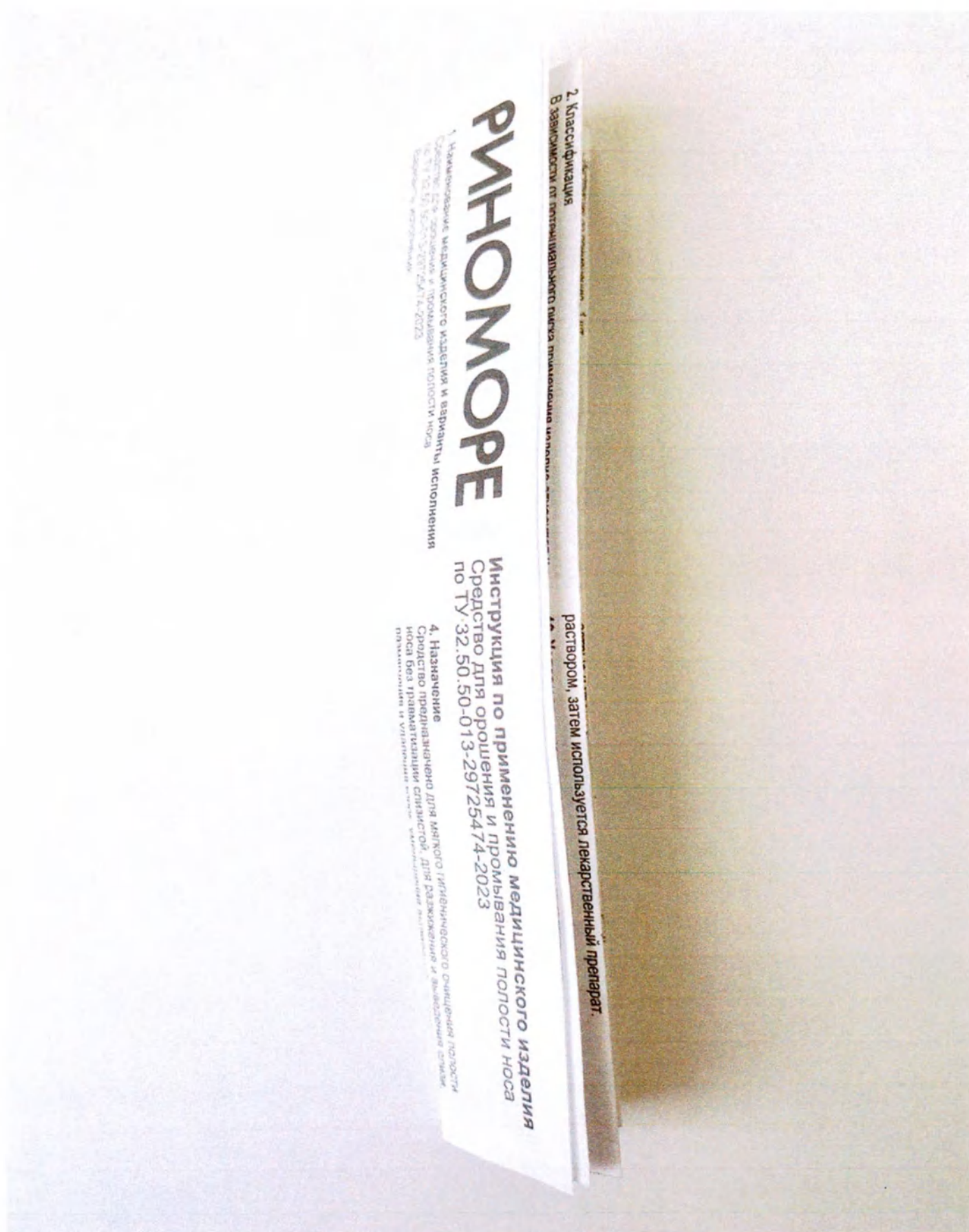


Рис. 106 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению



CMYK

 Pantone 2172 C

 Pantone 2287 C

Рис. 107 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 108 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 109 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия...

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
Баллончик, аэрозоль

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, плазматического и клеточного содержимого, уменьшения воспаления.

Рис. 110 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению



место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

СМУК

 Pantone 2172 C

 Pantone 2287 C

Рис. 111 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 112 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 113 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для разжижения и выведения слизи, отека.

Рис. 114 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
 Pantone 3405 C
 CMYK

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 50 мл

Для детей с 6 месяцев и взрослых.
 Предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, размягчения и удаления корок, уменьшения выделений, увлажнения слизистой оболочки полости носа.

СОСТАВ: вода очищенная, соль морская. Может применяться при беременности и лактации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см. инструкцию по применению медицинского изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. **АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1. **Тел.:** 8 (3852) 37-96-91. **www.vitam.pro.**
 Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:

Партия:

e 50 мл

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Рис. 115 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
 «Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 116 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» аэрозоль 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 117 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, общий вид

2. Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия

раствором, затем используется лекарственный препарат.

РИНОМОРЕ

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
Формы — распыляемая

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа без травматизации слизистой, для разжижения и выведения слизи, раздражителей и аллергенов.

Рис. 118 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, инструкция по применению

 **Pantone 2172 C**

 **Pantone 2287 C**

CMYK

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС»
спрей назальный 100 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых.
СОСТАВ: вода очищенная, соль
морская.
**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** см.
инструкцию по применению
медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
в недоступном для детей, защищенном
от прямых солнечных лучей месте при
температуре от +5°C до +25°C и
относительной влажности воздуха не
более 75%. Беречь от нагрева.

  **СРОК ГОДНОСТИ:**
3 года
e 100 мл

 **НАЗАЛЬНЫЙ
СПРЕЙ**
РИНОМОРЕ
**ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИГИЕНА
И УВЛАЖНЕНИЕ**
СРЕДСТВО
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ

9 БАЛАНС
г/л КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
Продукт», Россия, 656040,
Алтайский край, г. Барнаул,
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
д. 22 А, офис 3.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037,
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.

www.vitam.pro.
Претензии потребителей
принимаются по адресу фирмы-
изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 119 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 120 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 121 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травматизации слизистой для разжижения и выведения слизи, размяг-

Рис. 122 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 2577 C
CMYK

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации

Средство для орошения
и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС»
спрей назальный 100 мл
Для детей с 6 месяцев и взрослых.
СОСТАВ: вода очищенная, соль
морская.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см.
инструкцию по применению
медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
в недоступном для детей, защищенном
от прямых солнечных лучей месте при
температуре от +5°C до +25°C и
относительной влажности воздуха не
более 75%. Беречь от нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ:
3 года.
e 100 мл

NON
STERILE

и

КОНЦЕНТРАЦИЯ
МОРСКОЙ СОЛИ
9 г/л

БАЛАНС

ЛАРИНОРМ
sea®

Средство для орошения и промывания

Ежедневная гигиена
и увлажнение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
Продукт», Россия, 656040,
Алтайский край, г. Барнаул,
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
д. 22 А, офис 3.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037,
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro.
Петензии потребителей
принимаются по адресу фирмы-
изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 123 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, маркировка индивидуальной упаковки



Рис. 124 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 100 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 125 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, общий вид

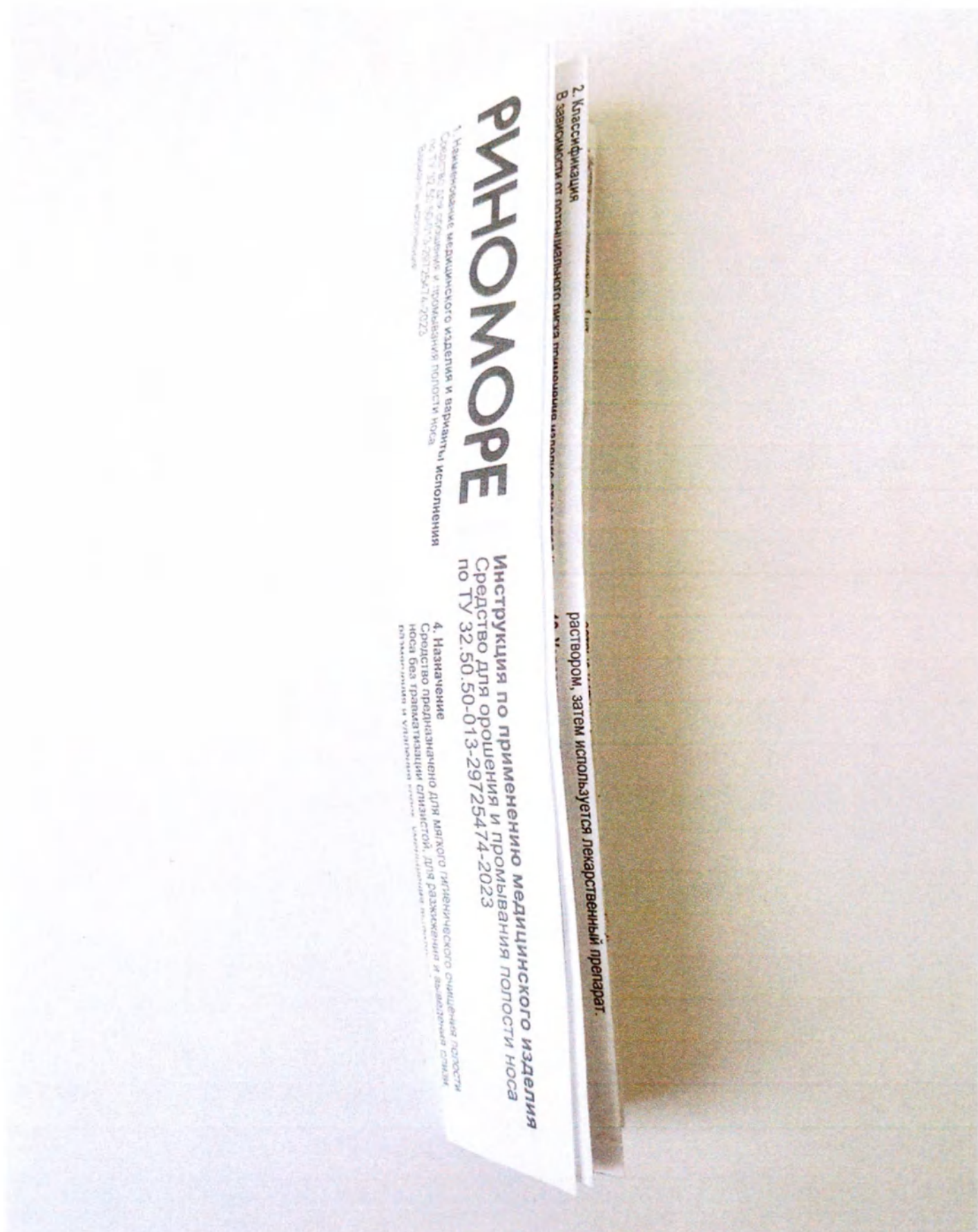


Рис. 126 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, инструкция по применению

 **Pantone 2172 C**

 **Pantone 2287 C**

CMYK

место для нанесения
номера и даты
государственной
регистрации



Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 50 мл. Для детей с 6 месяцев и взрослых. СОСТАВ: вода очищенная, соль морская. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: см. инструкцию по применению медицинского изделия. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

РИНОМОРЕ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИГИЕНА И УВЛАЖНЕНИЕ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ

9 БАЛАНС
г/л КОНЦЕНТРАЦИЯ МОРСКОЙ СОЛИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3. АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1. Тел.: 8 (3852) 37-96-91. www.vitam.pro. Претензии потребителей принимаются по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года

50 мл

Рис. 127 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки

CMYK

Pantone 2172 C

Pantone 2287 C



Рис. 128 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«РИНОМОРЕ БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 129 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, общий вид

ЛАРИНОРМ sea®

1. Наименование медицинского изделия и варианты исполнения
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

Инструкция по применению медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023

4. Назначение

Средство предназначено для мягкого гигиенического очищения полости носа
без травмирования слизистых для отекажения и выведения слизи, дренажа.

Рис. 130 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, инструкция по применению

Pantone 281 C
Pantone 2577 C
CMYK

место для нанесения
 номера и даты
 государственной
 регистрации

Средство для орошения
 и промывания полости носа по ТУ
 32.50.50-013-29725474-2023
 «Ларинорм Sea® БАЛАНС»
 спрей назальный 50 мл

Для детей с 6 месяцев и взрослых.
СОСТАВ: вода очищенная, соль
 морская. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 см. инструкцию по применению
 медицинского изделия.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить
 в недоступном для детей,
 защищенном от прямых солнечных
 лучей месте при температуре
 от +5°C до +25°C и относительной
 влажности воздуха не более 75%.
 беречь от нагрева.

  **СРОК ГОДНОСТИ:**
 3 года **e 50 мл**

Баланс

ЛАРИНОРМ
sea®

Средство для орошения и промывания

*Ежедневная гигиена
 и увлажнение*

 **КОНЦЕНТРАЦИЯ
 МОРСКОЙ СОЛИ**
9 г/л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Витамин
 Продукт», Россия, 656040,
 Алтайский край, г. Барнаул,
 п. Борзовая Заимка, ул. Радужная,
 д. 22 А, офис 3. **АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА:** 656037, Россия,
 Алтайский край, г. Барнаул,
 пр-т Калинина, влд. 116/81, стр. 1.
Тел.: 8 (3852) 37-96-91.
www.vitam.pro. Претензии
 потребителей принимаются
 по адресу фирмы-изготовителя.

Дата изготовления:
Партия:

Рис. 131 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
 «Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, маркировка индивидуальной упаковки

Pantone 281 C
Pantone 2577 C
CMYK



Рис. 132 Средство для орошения и промывания полости носа по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023 «Ларинорм Sea® БАЛАНС» спрей назальный 50 мл, маркировка потребительской упаковки



Рис. 133 Транспортная упаковка

Средство для орошения и промывания полости носа
по ТУ 32.50.50-013-29725474-2023
«Вариант исполнения»

Наименование грузополучателя: _____

Наименование пункта назначения: _____

Наименование грузоотправителя: _____

Наименование пункта отправления: _____

Надписи транспортных организаций: _____

Количество единиц упаковок, шт.: _____

Масса брутто, кг: _____

Дата изготовления: ____ . ____ . ____

Партия: ____

Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Беречь от нагрева.

Изготовитель: ООО «Витамин Продукт», Россия, 656040, Алтайский край, г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, д. 22 А, офис 3,
сайт: www.vitam.pro



Рис. 134 Маркировка транспортной упаковки

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
135 листа(ов)

Директор ООО «Витамин Продукт»

А.В. Сурков

«29» 09 2024 г.

