


**В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития**

Инструкция по применению изделия медицинского назначения для потребителей
Система инфузионная, трансфузионная
производства Wenzhou Beipu Science & Technology Co.,Ltd., Китай.

Перед использованием инфузионной и трансфузионной системы производства Wenzhou Beipu Science & Technology Co.,Ltd. (далее «устройство») внимательно изучите инструкцию по применению!

1. Проверьте целостность потребительской тары (пакета) и срок годности устройства.
2. Вскройте пакет и извлеките устройство;
3. Проверьте пригодность раствора к применению. Обработайте пробку бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком;
4. Снимите колпачок 1 с иглы 2 воздуховода. Введите иглу в пробку бутылки до упора. Закрепите трубку воздуховода вдоль бутылки так, чтобы ее конец был на уровне дна;
5. Закройте зажим 3. Снимите колпачок 1 с иглы 4 для подключения к бутылке. Введите иглу в пробку бутылки до упора;
6. Переверните бутылку и закрепите ее на штативе;

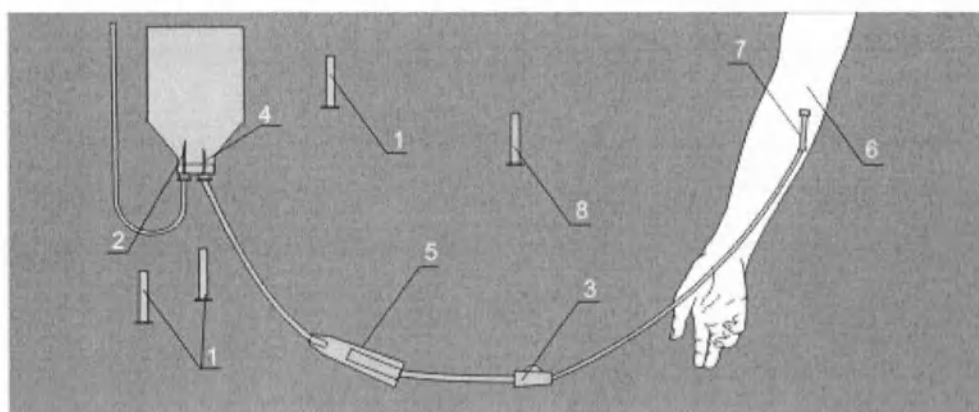

7. Проверьте соединение инъекционной иглы 6 с инъекционным узлом 7. При необходимости поверните инъекционную иглу 6 (в случае поставки инъекционной иглы в потребительской таре, вскройте тару, извлеките и присоедините иглу к инъекционному узлу 7);
8. Снимите колпачок 8 с инъекционной иглы 6;



9. Переверните капельницу 5 фильтром вверх. Откройте зажим, медленно заполните капельницу до полного погружения фильтра в инфузионный раствор, периодически надавливая на ее корпус;
10. Закройте зажим и верните капельницу в исходное положение. Фильтр должен быть заполнен полностью;
11. Откройте зажим и медленно заполните устройство до полного вытеснения воздуха и появления капли из инъекционной иглы 6. Закройте зажим;
12. Проверьте отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства;
13. Обработайте место венепункции антисептиком и произведите венепункцию;
14. Откройте зажим и отрегулируйте скорость вливания;
15. В случае закупорки иглы 4 закройте зажим 3 и осторожно сдавите корпус капельницы. При восстановлении тока жидкости откройте зажим;
16. Вводите медикаменты только через трубку инъекционного узла 7, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм;
17. Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионного раствора в бутылке в процессе вливания и, особенно, в конце для исключения воздушной эмболии;
18. При смене бутылки закройте зажим. Не извлекая инъекционную иглу из вены и не допуская опорожнения капельницы, извлеките иглы 2 и 4 из опорожненной бутылки. Быстро введите в пробку наполненной бутылки вначале иглу 2, затем иглу 4.
19. Устройство является медицинским изделием одноразового использования и подлежит утилизации как больничные отходы.

