

**Комплекс мобильный**  
**(центр лечебно-профилактический передвижной)**  
**по ТУ 9451-008-37600580-2012**

- ☐ ПМК-48415, кабинеты «Диагностика», «Гинекология», «Лаборатория»
- ☐ АЛ-59860С-2, кабинеты «Диагностика», «Гинекология», «Лаборатория»
- ☐ ПМК-5756С0-2, кабинеты «Диагностика», «Гинекология», «Лаборатория»
- ☐ 8724, кабинеты «Диагностика», «Гинекология», «Лаборатория»
- ☐ 185514, кабинет «Гинекология»
- ☐ 185514, кабинет «Вакцинация»
- ☐ 385427, кабинеты «Диагностика», «Гинекология»
- ☐ 385527, кабинеты «Диагностика», «Гинекология»
- ☐ 71497-0000010, кабинеты «Диагностика», «Предрейсовый осмотр»
- ☐ 71497-0000010, кабинеты «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», «Вакцинация»

Планировка \_\_\_\_

ПАСПОРТ

\* - При заказе исполнение выделено (в пустом квадрате стоит «х» или «✓»)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012 (далее – Комплекс), предназначен для применения в медицинских целях при установке его по месту временной дислокации и не предназначен для применения в медицинских целях при перевозках или перемещении.

В зависимости от назначения и комплектации Комплекс оснащен следующими медицинскими кабинетами:

- Кабинет «Диагностика»;
- Кабинет «Гинекология»;
- Кабинет «Лаборатория».
- Кабинет «Вакцинация».
- Кабинет «Предрейсовый осмотр».
- Кабинет «Передвижной пункт медицинского освидетельствования».

Транспортные средства ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724 по требованию заказчика могут поставляться с двумя видами планировок, приведенных в Приложении В: «планировка 1», «планировка 2».

На базе транспортного средства ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724 размещаются кабинеты «Диагностика», «Гинекология», «Лаборатория».

На базе транспортного средства 185514 размещается кабинет «Гинекология» или «Вакцинация»

На базе транспортного средства 385427, 385527 размещаются кабинеты «Гинекология», «Диагностика».

На базе транспортного средства 71497-0000010 размещаются кабинеты «Диагностика», «Предрейсовый осмотр», «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», «Вакцинация»

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Конструкция Комплекса

Комплекс представляет собой изотермический фургон (далее Кузов), состоящий из медицинских кабинетов (далее Кабинеты), коридора, генераторного отсека, отсека под внешний блок кондиционера и хозяйственного отсека (с возможностью размещения биотуалета). Размещение внешнего блока кондиционера и генератора допускается на наружных стенках фургона или на дышле ТС.

## 2.2 Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 2.1

**Таблица 2.1 – Основные технические характеристики Комплекса**

| Наименование параметра                                                                                                                                                     | Норма                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В                                                                                                                | 220/380                                           |
| Бортовая электросеть постоянного тока, В                                                                                                                                   | 12/24                                             |
| Аккумуляторные батареи аварийного электропитания, А·ч                                                                                                                      | 100                                               |
| Кабель для подключения к внешней питающей сети переменного тока, не менее м                                                                                                | 15                                                |
| Система отопления:<br>- конвекционные обогреватели, не менее кВт<br>- тепловая завеса, не менее кВт<br>- автономный воздушный отопитель на дизельном топливе, не менее кВт | 0,5<br>1<br>2                                     |
| Система водоснабжения и личной гигиены:<br>- емкость для чистой воды, л<br>- насосная станция, л<br>- электроводонагреватель, кВт<br>- емкость для использованной воды, л  | от 5 до 250<br>от 5 до 10<br>до 5<br>от 10 до 350 |

Масса комплекса, как снаряженного транспортного средства (без груза) и полная масса транспортного средства (с грузом) должна соответствовать Таблице 2.2. Допускаемое превышение любой массы должно быть не более 3 %, нижний предел масс не ограничивается.

**Таблица 2.2.**

| Тип транспортного средства | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| ПМК-48415                  | 11800                 | 23980            |
| АЛ-59860С-2                | 14400                 | 21600            |
| ПМК-5756С0-2               | 16400                 | 29000            |
| 8724                       | 7650                  | 10000            |
| 185514                     | 3320                  | 3500             |
| 385427                     | 6700                  | 6850             |
| 385527                     | 6300                  | 8700             |
| 71497-0000010              | 3200                  | 3500             |

Габаритные размеры каждого Комплекса должны соответствовать данным, указанным в Таблице 2.3 и на схемах в Приложении В. Допускаемое отклонение от линейных размеров не должно превышать  $\pm 5$  %.

Таблица 2.3.

| Тип транспортного средства | Габаритные размеры с учетом шасси (без учета шасси), мм: |             |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                            | Длина                                                    | Ширина      | Высота      |
| ПМК-48415                  | 10400 (7900)                                             | 2550 (2550) | 3750 (2600) |
| АЛ-59860С-2                | 9750 (7900)                                              | 2550 (2550) | 4000 (2600) |
| ПМК-5756С0-2               | 10420 (7900)                                             | 2550 (2550) | 3870 (2600) |
| 8724                       | 8100 (7900)                                              | 2550 (2550) | 3970 (2600) |
| 185514                     | 6088 (3565)                                              | 2206 (1960) | 2720 (1950) |
| 385427                     | 8150 (4630)                                              | 2400 (2040) | 3200 (1900) |
| 385527                     | 7400 (4630)                                              | 2400 (2040) | 3150 (1900) |
| 71407-0000010              | 7000(5600)                                               | 2300(2300)  | 3200(2100)  |

### 2.3 Каждый Комплекс оснащен комплектом систем автономного жизнеобеспечения:

- системой электроснабжения от автономных источников питания, таких как: генераторная установка, аккумуляторные батареи; преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC В;
- системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
- системой противопожарной защиты с пультом управления, комплектом датчиков и звуковым оповещателем.

### 2.4 Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала, изготавливаются из следующих материалов:

| Наименование материала                                            | НТД или марка материала                      | Изготовитель                                      | Применение                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Декоративный бумажно-слоистый пластик                             | Марка или ДБСП ТГ 2/03/С                     | ООО «Вышневолоцкий МДОК», Россия                  | Отделочные материалы           |
| Алюминий                                                          | Марка АД31                                   | ООО «Альменс» Россия                              | Алюминиевый профиль            |
| Резина                                                            | Марка ПР-632                                 | ООО «Самекс» Россия                               | Уплотнение стыковых соединений |
| Кожа искусственная                                                | Марка ЕСО, состав: Тик 85, полиуретан СКУ 7Л | ООО «Чеховские мануфактуры», Россия               | Обшивка стульев                |
| Нержавеющая сталь                                                 | 06ХН28МДТ                                    | ЗАО «ВЗПС», Россия                                | Мойка                          |
| Алюминий                                                          | профиль алюминиевый марки 6060               | ООО «Красноярский Металлургический Завод», Россия | Алюминиевый уголок             |
| Композит, армированный стекловолокном Optiplan Polydet Perfomance | Покрытие «гелькоут», стекломат, UP-смола     | OPTIPLAN GmbH, Германия                           | Сэндвич панели                 |
| Коммерческий линолеум                                             | Марка ПВХ-С-7058 М                           | АО «ТАРКЕТТ», Россия                              | Напольное покрытие             |

### 3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплекс состоит из (выделяется знаком «х» или «√»):

#### 1. Базовое транспортное средство:

ПМК-48415  
АЛ-59860С-2  
ПМК-5756С0-2  
8724  
185514  
385427  
385527  
71497-0000010

#### • Перечень медицинского и специального оборудования:

| № п/п                           | Наименование/тип                                                                                                                                                                                                                     | Обозначение документа, изготовитель                                                         | Кол. | Примечание        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>Медицинское оборудование</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |      |                   |
| <b>Кабинет «Гинекология»</b>    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |      |                   |
| 1.                              | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                            | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)                                         | 1    | При необходимости |
| 2.                              | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                                         | 1    | При необходимости |
| 3.                              | Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01                                                                                                                                  | Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)       | 1    | При необходимости |
| 4.                              | Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018                                                                                                                                                                                    | Производство: ООО «Здоровый Мир», Россия (РЗН 2013/733)                                     | 1    | При необходимости |
| 5.                              | Кольпоскоп КС-01 по ТУ 9442-001-52132018-2003                                                                                                                                                                                        | Производство: ООО «Здоровый Мир», Россия (РЗН 2013/733)                                     | 1    | При необходимости |
| 6.                              | Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013                                                                                                        | Производство: ООО ПКФ «Современная импедансная медицинская техника», Россия (РЗН 2014/2264) | 1    | При необходимости |
| 7.                              | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                                                                                               | Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305)                                       | 1    | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 8.  | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                                                                                                                  | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/08890)                                    | 1 | При необходимости |
| 9.  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150                                                                                                                                                                          | Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) | 1 | При необходимости |
| 10. | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП                                                                                                                                                                                | Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607) | 1 | При необходимости |
| 11. | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003                                                                                                                               | Производство: ООО «НПП «Монитор», Россия (ФСР 2012/14015)                                | 1 | При необходимости |
| 12. | Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED                                                                                                                                                                         | Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12398)                           | 1 | При необходимости |
| 13. | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009                                                                                                                                                                                       | Производство: ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07047)                          | 1 | При необходимости |
| 14. | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                     | Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)                    | 1 | При необходимости |
| 15. | Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003,                                                                                                                                                                                                        | Производство: Можайский МИЗ, Россия (ФСР 2007/00787)                                     | 1 | При необходимости |
| 16. | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ                                                                                                                                               | Производство: ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332)                         | 1 | При необходимости |
| 17. | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                       | Производство: Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)                | 1 | При необходимости |
| 18. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ» | Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)                                  | 1 | При необходимости |
| 19. | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                            | Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100)                           | 1 | При необходимости |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |            |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 20.                          | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса Модель: PRO-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство: B.Well Swiss AG, Швейцария (РЗН 2016/4964)                                        | 1          | При необходимости |
| 21.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) | 1          | При необходимости |
| 22.                          | Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)                                             | Не более 3 | При необходимости |
| <b>Кабинет «Диагностика»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |            |                   |
| 1.                           | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)                                             | 1          | При необходимости |
| 2.                           | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                            | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                                             | 1          | При необходимости |
| 3.                           | Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12398)                                  | 1          | При необходимости |
| 4.                           | Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)           | 1          | При необходимости |
| 5.                           | Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство: «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726)                                        | 1          | При необходимости |
| 6.                           | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607)        | 1          | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                    |                                                                                             |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 7.  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in         | Производство: Биохемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)                   | 1 | При необходимости |
| 8.  | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                             | Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305)                                       | 1 | При необходимости |
| 9.  | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004                         | Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928)                                        | 1 | При необходимости |
| 10. | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ                 | Производство: ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332)                            | 1 | При необходимости |
| 11. | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                    | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/08890)                                       | 1 | При необходимости |
| 12. | Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)                                                                   | Производство: "АйЭнДи Диагностика Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039)                            | 1 | При необходимости |
| 13. | Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями                                                                               | Производство: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (ФСЗ 2008/01996)  | 1 | При необходимости |
| 14. | Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями                                                                                        | Производство: "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629). | 1 | При необходимости |
| 15. | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003 | Производство: ООО «НПП «Монитор», Россия (ФСР 2012/14015)                                   | 1 | При необходимости |
| 16. | Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018                                                                 | Производство: ООО "Нейрософт", Россия (ФСР 2009/05172)                                      | 1 | При необходимости |
| 17. | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101                              | Производство: «Фукуда Дэнси Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4703)                              | 1 | При необходимости |
| 18. | Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222                                                                                 | Производство: ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379)                               | 1 | При необходимости |
| 19. | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями              | Производство: ООО "Альтомедика", Россия. (РЗН 2013/809)                                     | 1 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                     |                                                                                             |   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 20. | Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017 | Производство:<br>Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513)  | 1 | При необходимости |
| 21. | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I                                                                  | Производство:<br>«МИР С.р.л. – МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ», Италия (РЗН 2017/5323)           | 1 | При необходимости |
| 22. | Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe                                                                                         | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207)                           | 1 | При необходимости |
| 23. | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                               | Производство:<br>«3М Компания, 3М Хеле Кеар», США (РЗН 2016/4622)                           | 1 | При необходимости |
| 24. | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп ri-derma                                                                    | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03906)                           | 1 | При необходимости |
| 25. | Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: YX300, YX301                                                                                                | Производство:<br>"Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461) | 1 | При необходимости |
| 26. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150                                                             | Производство:<br>ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) | 1 | При необходимости |
| 27. | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002                                                  | Производство:<br>ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958) | 1 | При необходимости |
| 28. | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck, C-128 Гц                   | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456)                           | 1 | При необходимости |
| 29. | Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним                                                                                   | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03908)                           | 1 | При необходимости |
| 30. | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                              | Производства:<br>ООО «Полимерные изделия», Россия (ФСР 2010/07935)                          | 1 | При необходимости |
| 31. | Носилки жесткие НЖ-ММ по ТУ 9451-003-10660186-00                                                                                                                    | Производство:<br>ООО "НПП "Микромонтаж", Россия (ФСР 2010/07236)                            | 1 | При необходимости |
| 32. | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008                                                                                                | Производство:<br>ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509)                              | 1 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |   |                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 33. | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д        | Производство:<br>ООО «МЕДПЛАНТ»,<br>Россия<br>(ФСР 2007/00439)                       | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 34. | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004                                                                   | Производство:<br>ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия<br>(РЗН 2014/1928)                        | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 35. | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С | 1 Производство:<br>2 АО "Елатомский<br>приборный завод", Россия<br>3 (РЗН 2016/3585) | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 36. | Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС®" (OPTIONIX®) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020                                                                                                 | 4 Производство:<br>5 ЗАО «НПО<br>«МЕДКАР»<br>6 (РЗН 2020/10607)                      | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 37. | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008                                                                                                                                     | Производство:<br>ООО Пневмоприбор,<br>Россия<br>(ФСР 2009/ 06204)                    | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 38. | Проектор знаков экранный офтальмологический ТСР, с принадлежностями, варианты исполнений: ТСР-3000 Р                                                                                         | Производство:<br>Томэй ГмбХ, Германия<br>(ФСЗ 2010/07992)                            | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 39. | Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями                                                                                                           | Производство:<br>«Рексам Ко., Лтд.»,<br>Япония<br>(РЗН 2016/4151)                    | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 40. | Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002                                                                                                                 | Производство:<br>ООО МРП «Техноаргус»,<br>Россия (ФСР 2007/00471)                    | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 41. | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102ТУ                                                                                                              | Производство:<br>АО «Елатомский<br>приборный завод»,<br>Россия<br>(РЗН 2015/2997)    | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 42. | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                         | Производство:<br>OMRON HEALTHCARE<br>Co., Ltd, Япония<br>(ФСЗ 2009/05422)            | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 43. | Набор для минитрахеостомии                                                                                                                                                                   | Производство:<br>"Смитс Медикал<br>Интернэшнл Лимитед"<br>(ФСЗ № 2009/05211)         | 1 | При<br>необходи<br>мости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |   |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 44. | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм | Производство:<br>ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия (ФСР 2010/07335)                                           | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 45. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                    | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                      | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 46. | Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"                                                                                                                                                     | Производство:<br>АО "ПОЗИС", Россия<br>(ФСР 2009/05705)                                               | 2 | При<br>необходи<br>мости |
| 47. | Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство:<br>"Шэньчжэнь Майндрэй<br>Био-Медикал<br>Электроникс Ко., Лтд.",<br>КНР (РЗН 2017/6115) | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 48. | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFIB (M110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство:<br>Метракс ГмбХ, Германия<br>(ФСЗ 2011/10093)                                           | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 49. | Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Производство:<br>ООО "Медицинские<br>компьютерные системы",<br>Россия (ФСР 2007/00155)                | 1 | При<br>необходи<br>мости |
| 50. | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014 Варианты исполнения: 3. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ»                                                                                                                                                                                                                         | производство ООО<br>«МЕДПЛАНТ», Россия<br>(РЗН 2015/2746) – 1 шт.                                     | 1 | При<br>необходи<br>мости |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |            |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 51.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Мagma» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство:<br>ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия<br>(ФСР 2008/03973) | 1          | При необходимости |
| 52.                          | Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия<br>(РЗН 2013/1292)                                             | Не более 3 | При необходимости |
| <b>Кабинет «Лаборатория»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |            |                   |
| 1.                           | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия<br>(ФСР 2011/12132)                                             | 1          | При необходимости |
| 2.                           | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                            | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия<br>(ФСР 2011/11388)                                             | 1          | При необходимости |
| 3.                           | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Производство:<br>«Полимер Технолоджи Системс, Инк.», США (РЗН 2015/2693)                              | 1          | При необходимости |
| 4.                           | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Производство:<br>ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498)                                        | 1          | При необходимости |
| 5.                           | Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>«Хай Текнолоджи, Инк.», США<br>(РЗН 2016/3986)                                       | 1          | При необходимости |
| 6.                           | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>«Хай Текнолоджи, Инк.», США<br>(ФСЗ 2010/07756)                                      | 1          | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 7.  | Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch®, вариант исполнения: EasyTouch® GCHb, производство Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань (ФСЗ 2011/10454) – 1 шт.<br>8. Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)                                        | Производство:<br>77 Электроника Кфт,<br>Венгрия (РЗН 2019/9342)                               | 1 | При необходимости |
| 8.  | Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)                                                                                                                                                                                                                  | Производство:<br>77 Электроника Кфт,<br>Венгрия (РЗН 2019/9342)                               | 1 | При необходимости |
| 9.  | Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями                                                                                                                                                                                                             | Производство:<br>Вест Медика<br>Продукционс- унд<br>Хайдельс-ГмбХ, Австрия<br>(РЗН 2017/5740) | 1 | При необходимости |
| 10. | Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями                                                                                                                                                                          | Производство:<br>«Диессе Диагностика<br>Сенезе С.п.А.», Италия<br>(РЗН 2019/9149)             | 1 | При необходимости |
| 11. | Анализатор мочи DocUReader с принадлежностями, исполнения: DocUReader                                                                                                                                                                                                            | Производства<br>77 Электроника Кфт,<br>Венгрия (ФСЗ<br>2012/13515)                            | 1 | При необходимости |
| 12. | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия<br>(ФСР 2011/10034)                                     | 1 | При необходимости |
| 13. | Система для измерения уровня гемоглобина НемоControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                          | Производство:<br>"ЕКФ-диагностик ГмбХ",<br>Германия<br>(ФСЗ 2008/02911)                       | 1 | При необходимости |
| 14. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ» | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия<br>(РЗН 2013/1089)                              | 1 | При необходимости |
| 15. | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                                                                                                                  | Производство:<br>ООО «МЕДПЛАНТ»,<br>Россия<br>(ФСР 2010/08890)                                | 1 | При необходимости |
| 16. | Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                     | Производство:<br>АО "Елатомский<br>приборный завод", Россия<br>(РЗН 2016/3585)                | 1 | При необходимости |
| 17. | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                        | Производство:<br>«Ченгду Рич Сайенс<br>Индастри Ко., Лтд.»,<br>Китай (ФСЗ 2010/06301)         | 1 | При необходимости |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                   |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 18.                         | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                                | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 19.                         | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство:<br>ООО научно-<br>производственная фирма<br>Костромская медтехника,<br>Россия<br>(ФСР 2008/03973) | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 20.                         | Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия<br>(РЗН 2013/1292)                                                       | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |
| <b>Кабинет «Вакцинация»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                   |                          |
| 1.                          | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                            | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия<br>(ФСР 2011/11388)                                                       | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 2.                          | Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Производство:<br>АО "ПОЗиС", Россия<br>(ФСР 2012/13836 )                                                        | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 3.                          | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия<br>(ФСР 2011/12132)                                                       | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 4.                          | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010. Вариант исполнения: - в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2, без ларингоскопа                                                                                                                                                                                                                               | Производство:<br>ООО «МЕДПЛАНТ»,<br>(ФСР 2010/07335)                                                            | 1                 | При<br>необходи<br>мости |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 5.  | Дозаторы для дезинфицирующих средств и мыла, Модель UD-9000 бесконтактный дозатор                                                                                                            | Производство: "Саяра Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2017/6270)                                                 | 1 | При необходимости |
| 6.  | Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)                                                                                                                           | Производство: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05423)                                        | 3 | При необходимости |
| 7.  | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU)                                                                                           | Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (РЗН 2015/3210)                                           | 1 | При необходимости |
| 8.  | Пульсоксиметр gi-fox                                                                                                                                                                         | Производство: "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00483)                                          | 1 | При необходимости |
| 9.  | Шкафы медицинские ПАКС металл по ТУ 9452-002-96303248-2016. Варианты исполнения: V. Шкафы медицинские серии АМ: - Шкаф медицинский АМ-1.                                                     | Производство: ООО "ПАКС-трейд", Россия (РЗН 2017/5700)                                                  | 1 | При необходимости |
| 10. | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015. Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05                                                   | Производство: ООО Концерн "Аксион" Россия (РЗН 2017/5391)                                               | 1 | При необходимости |
| 11. | Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008. Лоток почкообразный ЛМП - "МЕДИКОН", размерами в мм: 200 x 120 x 30                                              | Производство: ООО "Научно-производственная фирма "МЕДИКОН", Россия (ФСР 2008/03233)                     | 1 | При необходимости |
| 12. | Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХМЕД                                                                                                                                        | Производство: "Апексмед Интернэшнл Б. В.", Нидерланды (ФСЗ 2011/10188)                                  | 1 | При необходимости |
| 13. | Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Дезиптол". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-003-17156278-2013.                                                                | Производство: ООО "Компания" НПХ", Россия ЗАО НПО "Химсинтез", Россия (RU.77.99.88.002.E.00156 9.04.18) | 1 | При необходимости |
| 14. | Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ) по ТУ 9398-035-42965160-2007                                                                                                                           | Производство: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия (ФСР 2008/02391)                                       | 1 | При необходимости |
| 15. | Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ                                                                                                                                                    | Производство: АО "КАМПО", Россия (ФСР 2011/09914)                                                       | 1 | При необходимости |
| 16. | Морозильник биомедицинский глубокой заморозки модели DW-40 с принадлежностями вариант исполнения: DW-40L92                                                                                   | Производство: "Циндао Хайер Биомедикал Ко., Лтд.", Китай (ФСЗ 2012/13474)                               | 1 | При необходимости |
| 17. | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С | Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)                                   | 3 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                   |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 18. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                                | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 19. | Стулья медицинские марки «КМ-Мagma» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство:<br>ООО научно-<br>производственная фирма<br>Костромская медтехника,<br>Россия<br>(ФСР 2008/03973) | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |
| 20. | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия<br>(РЗН 2013/1292)                                                       | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |
| 21. | Термоконтёйнеры для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов с охлаждающими элементами по ТУ 9452-002-29927143-2014, вариант исполнения МТП-L9                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "МТП", Россия<br>(РЗН 2015/3413)                                                           | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 22. | Изделия для фиксации ёмкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия (РЗН 2014/1603)                                                      | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 23. | Полотенца универсальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Производство:<br>ООО "Авангард", Россия                                                                         | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 24. | Пленки одноразовые впитывающие "iD", размеры: 40x60; 60x60; 60x90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Производство:<br>"Онтекс БВ", Россия<br>(РЗН 2017/6287)                                                         | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 25. | Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по ТУ 9398-001-37492896-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "ПКФ<br>"Медкомплект", Россия<br>(РЗН 2013/238)                                            | 1                 | При<br>необходи<br>мости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 26. | <p>Набор "Аптечка ПРОТИВОШОКОВАЯ (АнтиШок) в составе:</p> <p>Преднизолон Эльфа, рег № ЛС-000078</p> <p>Супрастин РУ № П N012426/02</p> <p>Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см3 (мл), 2 см3 (мл), 3 см3 (мл), 5 см3 (мл), 10 см3 (мл), 20 см3 (мл), 30 см3 (мл), 50 см3 (мл), 60 см3 (мл), 100 см3 (мл), 150 см3 (мл) с иглами и без. № РУ ФСЗ 2009/03552</p> <p>Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные типа "Луер" (с манжетой) в комплекте с иглой инъекционной, стерильные по ТУ 9398-006-81136323-2011. № РУ ФСР 2008/03544</p> <p>Эуфиллин, ЛП-003461-160216 изм. №1</p> <p>Адреналин-СОЛОфарм, ЛП-004465-190917</p> | <p>Производство:</p> <p>ООО "ПАРЕНТКОМ",</p> <p>Россия</p> | 1 | При необходимости |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------------------|

**Кабинет «Предрейсовых и послерейсовых осмотров»**

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |            |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                             | <p>Производство:</p> <p>АО «КРОНТ-М»,</p> <p>Россия</p> <p>(ФСР 2011/12132)</p>                       | Не более 3 | При необходимости |
| 2. | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | <p>Производство:</p> <p>АО «КРОНТ-М»,</p> <p>Россия</p> <p>(ФСР 2011/11388)</p>                       | Не более 3 | При необходимости |
| 3. | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                             | <p>Производство:</p> <p>АО «КРОНТ-М»,</p> <p>Россия</p> <p>(ФСР 2011/12132)</p>                       | Не более 3 | При необходимости |
| 4. | Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017                                                                  | <p>Производство:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513)</p> | 1          | При необходимости |
| 5. | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200, производства "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689)                                                       | <p>Производство:</p> <p>"Сентек Корея Корп.",</p> <p>Корея (РЗН 2014/1689)</p>                        | 1          | При необходимости |
| 6. | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                 | <p>Производство :</p> <p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05422)</p>                       | 1          | При необходимости |
| 7. | Тесты NARCOSCREEN (тест-полоски, тест-кассеты) для выявления наркотических веществ в моче и слюне                                                                                                                                    | <p>Производство:</p> <p>"ИнТек Продактс, Инк.",</p> <p>КНР (ФСЗ 2010/08095)</p>                       | 1          | При необходимости |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 8.                                                                  | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство:<br>«3М Компания, 3М Хеле<br>Кеар», США<br>(РЗН 2016/4622)                                    | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 9.                                                                  | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производства АО<br>"Елатомский приборный<br>завод", Россия (РЗН<br>2016/3585)                              | 1                 | При<br>необходи<br>мости |
| 10.                                                                 | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                               | Производства ООО<br>"ТК "Респект", Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                               | Не<br>боле<br>е 2 | При<br>необходи<br>мости |
| 11.                                                                 | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство OMRON<br>ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.,<br>Япония (ФСЗ 2012/12100)                                        | Не<br>боле<br>е 2 | При<br>необходи<br>мости |
| 12.                                                                 | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | производства ООО<br>научно-производственная<br>фирма Костромская<br>медтехника, Россия (ФСР<br>2008/03973) | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |
| 13.                                                                 | Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производства ООО<br>"Гелиокс", Россия РЗН<br>2013/1292)                                                    | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |
| <b>Кабинет «Передвижной пункт медицинского освидетельствования»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                   |                          |
| 1.                                                                  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>АО «КРОНТ-М»,<br>Россия<br>(ФСР 2011/12132)                                               | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |
| 2.                                                                  | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство:<br>АО «КРОНТ-М»,<br>Россия<br>(ФСР 2011/11388)                                               | Не<br>боле<br>е 3 | При<br>необходи<br>мости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 3.  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство: АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132)                                             | Не более 3 | При необходимости |
| 4.  | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456)                                  | 1          | При необходимости |
| 5.  | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство: «3М Компания, 3М Хеле Кеар», США (РЗН 2016/4622)                                  | 1          | При необходимости |
| 6.  | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05422)                                | Не более 2 | При необходимости |
| 7.  | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100)                                  | Не более 2 | При необходимости |
| 8.  | Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов "АПИЛУЧ" СЦРГ.941439.002 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Производства: ООО "Битест", Россия (РЗН 2019/9481)                                              | 1          | При необходимости |
| 9.  | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)                           | Не более 2 | При необходимости |
| 10. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                               | Производство:\nООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)                                        | Не более 2 | При необходимости |
| 11. | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) | Не более 3 | При необходимости |

|                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                           |              |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 12.                             | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                    | Производство ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292)                         | Не более 3   | При необходимости |
| <b>Транспортное средство</b>    |                                                                                                                                                                               |                                                                           |              |                   |
| 1.                              | ПМК-48415                                                                                                                                                                     | Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                     | 1            |                   |
| 2.                              | АЛ-59860С-2                                                                                                                                                                   | Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                     | 1            |                   |
| 3.                              | ПМК-5756С0-2                                                                                                                                                                  | Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                     | 1            |                   |
| 4.                              | 8724                                                                                                                                                                          | Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                     | 1            |                   |
| 5.                              | 185514                                                                                                                                                                        | Производство: ООО «Форвард», Россия                                       | 1            |                   |
| 6.                              | 385427                                                                                                                                                                        | Производство: ООО «Форвард», Россия                                       | 1            |                   |
| 7.                              | 385527                                                                                                                                                                        | Производство: ООО «Форвард», Россия                                       | 1            |                   |
| 8.                              | 71497-0000010                                                                                                                                                                 | Производство: ООО «ДжиТиЭс-трейлер», Россия                               | 1            |                   |
| <b>Специальное оборудование</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                           |              |                   |
| 1.                              | Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 40                                                                                                                   | Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия                     | Не более 2   |                   |
| 2.                              | Воздушный отопитель модели: Airtronic D4                                                                                                                                      | Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия | Не более 2   |                   |
| 3.                              | Воздушный отопитель AER D5                                                                                                                                                    | Производство: «A100», Китай                                               | Не более 2   |                   |
| 4.                              | Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ                                                                                                                                     | Производство: ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия                                   | Не более 2   |                   |
| 5.                              | Воздушная завеса Арктос Мини-3                                                                                                                                                | Производство: ООО «Арктос», Россия                                        | не более 2   |                   |
| 6.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                           | Производство: "MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.", Сингапур  | 1 Не более 2 |                   |
| 7.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель <a href="#">MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1</a> | Производство: Midea Group, Китай                                          | Не более 2   |                   |
| 8.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q                                  | Производство: Midea Group, Китай                                          | Не более 2   |                   |

|     |                                                                                                                                                                         |                                                        |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--|
| 9.  | Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ                                                                         | Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Япония  | Не более 2 |  |
| 10. | Сплит-система т.м. «Dometic»                                                                                                                                            | Производство: "Dometic Italy S.p.a.", Италия           | Не более 2 |  |
| 11. | Накрышный кондиционер Webasto cool top trail                                                                                                                            | Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия  | Не более 2 |  |
| 12. | Электрический кондиционер Autoclima                                                                                                                                     | Производство: AUTOCLIMA, Италия                        | Не более 2 |  |
| 13. | Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU | Производство: «General Climate LTD», Китай             | Не более 2 |  |
| 14. | Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3                                                                                                                      | Производство: « <a href="#">Royal Clima</a> », Китай   | Не более 2 |  |
| 15. | Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N)                                                                                                                                | Производство: «Haier» Китай                            | Не более 2 |  |
| 16. | Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC                                                                                                                               | Производство: «Hisense» Китай                          | Не более 2 |  |
| 17. | Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE                                                                                                                               | Производство: «Hisense» Китай                          | Не более 2 |  |
| 18. | Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN                                                                                                                              | Производство: « <a href="#">Royal Clima</a> », Китай   | Не более 2 |  |
| 19. | Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA                                                                                                                                  | Производство: «Haier» Китай                            | Не более 2 |  |
| 20. | Мульти сплит-система, Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER1*3 / MXZ-3HJ50VA ER1                                                                                            | Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Таиланд | Не более 2 |  |
| 21. | Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMEX», модели: SH6500EX-R, SH11000-R, SH7600EX                                                                           | Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония     | 1          |  |
| 22. | Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116                                                                                                                           | Производство: «Kubota Corporation», Япония             | 1          |  |
| 23. | Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC                                                                                                                            | Производство: «TOYO DENKI INDUSTRIAL CO.,LTD» Япония   | 1          |  |
| 24. | Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500                                                                                                                               | Производство: ЗАО «Зубр ОВК»                           | 1          |  |
| 25. | Генератор Fubag TI 4300                                                                                                                                                 | Производство: «Fubag», Германия                        | 1          |  |
| 26. | Бензиновый генератор Denzel GT-2600i (2300 Вт)                                                                                                                          | Производство: «MATRIZE Handels GmbH», Германия.        | 1          |  |
| 27. | Бензиновый генератор «Energo», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE                                                                                    | Производство: «Energo» Россия                          | 1          |  |

|     |                                                                                                                                       |                                                             |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| 28. | Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA                                                                             | Производство: «Briggs & Stratton» США                       | 1          |  |
| 29. | Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E                                                                                         | Производство: «Yamaha», Китай, Япония                       | 1          |  |
| 30. | Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E                                          | Производитель: «ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», Китай  | 1          |  |
| 31. | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4, Spote E-5 Plus                                | Производство: «Noirot S.A.S.», Франция                      | не более 6 |  |
| 32. | Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11                                                              | Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия | не более 6 |  |
| 33. | Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000            | Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия | не более 6 |  |
| 34. | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель BHC-L08-T03              | Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия | не более 2 |  |
| 35. | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                           | Производство: ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия           | 1          |  |
| 36. | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120 | Производство: ООО «Версет», Россия                          | 1          |  |
| 37. | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO                                                           | Производство: ООО «МикроАрт», Россия                        | 1          |  |
| 38. | Установка вентиляционная, модель Breezart                                                                                             | Производство: ООО «КЛИМАТСОФТ», Россия                      | 1          |  |
| 39. | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                               | Производство: ООО «ВАНВЕНТ», Россия                         | 1          |  |
| 40. | Сенсорный дозатор для антисептика и мыла UD-9000                                                                                      | Производство: «Saraya», Япония                              | 1          |  |
| 41. | Биотуалет Thetford Porta Potti                                                                                                        | Производство: «Thetford», Нидерланды                        | 1          |  |
| 42. | Холодильник BVK, RF-068                                                                                                               | Производство: BVK Electronics LTD, КНР                      | не более 2 |  |

#### Встраиваемая мебель

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--|
|    | «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Функциональная диагностика», «Лаборатория», «Гинекология», на базе транспортных средств ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724. |               |   |  |
| 1. | Столешница для крепления к стенам БСП161500400                                                                                                                                                                                                            | МДКР.0010.000 | 1 |  |
| 2. | Столешница для крепления к стенам БСП16900500                                                                                                                                                                                                             | МДКР.0010.000 | 1 |  |
| 3. | Столешница для крепления к стенам БСП161500700                                                                                                                                                                                                            | МДКР.0010.000 | 1 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |               |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161000900                   | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                            | МДКР.0010.000 | не более 4 |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                      | МДКР.0010.000 | не более 3 |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1800600550                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Гинекология», на базе транспортного средства 185514                                                                                 |                                                                  |               |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М. | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП16800400.                   | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП16300300.                   | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Диагностика», «Гинекология», на базе транспортного средства 385427 или 385527                                                       |                                                                  |               |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161060970.  | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161350400                   | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам 16800400                       | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1800600550                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                            | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Вакцинация», на базе транспортного средства 185514                                                                                  |                                                                  |               |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1855650550                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                            | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161500700                   | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | ШОР1900680665                                                    | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                      | МДКР.0010.000 | не более 6 |  |
| Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Диагностика», «Предрейсовый осмотр», на базе транспортного средства 71497-0000010                                                    |                                                                  |               |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161060970.  | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161350400                   | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам 16800400                       | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1800600550                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                      | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                            | МДКР.0010.000 | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: или Кабинет «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», кабинет «Вакцинация», на базе транспортного средства 71497-0000010 |                                                                  |               |            |  |

|                                      |                                                                 |                  |   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---|--|
| 1.                                   | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161060970. | МДКР.0010.000    | 1 |  |
| 2.                                   | Столешница для крепления к стенам БСП161350400                  | МДКР.0010.000    | 1 |  |
| 3.                                   | Столешница для крепления к стенам 16800400                      | МДКР.0010.000    | 1 |  |
| 4.                                   | Кушетка-рундук КР1800600550                                     | МДКР.0010.000    | 1 |  |
| 5.                                   | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | 1 |  |
| 6.                                   | Умывальник УД16400400                                           | МДКР.0010.000    | 1 |  |
| <b>Эксплуатационная документация</b> |                                                                 |                  |   |  |
| 1.                                   | Руководство по эксплуатации                                     | МДКР.0010.000 РЭ | 1 |  |
| 2.                                   | Паспорт                                                         | МДКР.0010.000 ПС | 1 |  |
| 3.                                   | Эксплуатационные документы на покупные части                    | РЭ               | - |  |

#### **4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

Комплекс может транспортироваться в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида своим ходом или авиационным, водным и железнодорожным транспортом без разборки, а также с разборкой на шасси и кузов-фургон в соответствии с договором на поставку.

При транспортировании железнодорожным транспортом, размещение и крепление на открытой платформе или в вагоне должно выполняться в соответствии с требованиями ЦМ-943 «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» МПС России, а также эксплуатационной документации на Комплекс и базовое транспортное средство.

При погрузочных и разгрузочных работах должны быть приняты меры для защиты Комплекса от механических повреждений.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Комплекс должен храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 1 года. При хранении необходимо учитывать требования к хранению базового транспортного средства и требованиям по хранению других комплектующих изделий.

Если после указанного срока Комплекс не вводится в эксплуатацию, то необходимо произвести его консервацию в соответствии с ГОСТ 9.014 с целью обеспечения его сохранности и работоспособности.

При хранении в закрытых помещениях более 1 месяца производится очистка Комплекса; увеличивается давление воздуха в шинах на 0,5 бара от номинального значения; отпускается стояночный тормоз и устанавливаются противооткатные башмаки; отсоединяется аккумуляторная батарея и связываются кабельные наконечники и зажимы.

При хранении под открытым небом более 1 месяца проводятся те же самые работы, что и при хранении в закрытых помещениях, а также отводятся стеклоочистители от ветрового стекла; закрываются все отверстия для впуска воздуха и устанавливается система отопления на «Выкл.»; демонтируется аккумуляторная батарея и хранится в соответствии с информацией изготовителя.

На площадках хранения Комплекс должен быть размещен с устройством проездов и проходов, обеспечивающих безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ, уборку территории.

#### **5. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

В период эксплуатации Комплекса должны выполняться инструкции по эксплуатации, порядок и правила исполнения работ по техническому обслуживанию, установленные в эксплуатационных документах.

Передвижение Комплекса осуществляется по дорогам с твердым асфальтовым покрытием не более 60 км/ч, а по грунтовым не более 20 км/ч.

Эксплуатация Комплекса допускается при температуре на улице: от минус 40°C до +40°C; внутри Комплекса: не менее +15°C и не более +35°C.

Потребитель должен производить замену по истечению срока годности огнетушителей, содержимого медицинской аптечки и других расходных материалов.

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса настоящим требованиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при общем пробеге за этот период не более 60000 км.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка на базовое транспортное средство, двигатель, шины, аккумуляторные батареи и лампы даются предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными на них стандартами.

Средний срок службы Комплексов должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления Комплекса путем ремонта. Оценка состояния Комплекса проводится комиссией на основании дефектной ведомости и акта.

Использование Комплекса не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний руководства по эксплуатации и внесение каких-либо конструкторских изменений без согласования с разработчиком конструкторской документации, не разрешаются.

В случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензии не рассматривает.

## **7. УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация транспортного средства, полуприцепа согласно требованиям заводов изготовителей, указанных в инструкциях на изделия.

Утилизация медицинских изделий и специального оборудования осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Утилизация медицинского оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения, согласно СанПиН 2.6.1.2891.

Утилизации медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной)

по ТУ 9451-008-37600580-2012

Кабинеты: Диагностика Гинекология Лаборатория Вакцинация  
(нужное подчеркнуть)

Серийный № \_\_\_\_\_

Транспортное средство \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ОТК \_\_\_\_\_

М.П.

## Приложение А (обязательное)

ЗАО «НПО «МЕДКАР»: 140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

Адрес производства: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 10

Телефон: +7(495) 540-45-96, e-mail: [med@medcar.ru](mailto:med@medcar.ru)

### Гарантийный талон

На ремонт в течение гарантийного срока

### Изделие медицинского назначения

**Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной)**

**по ТУ 9451-008-37600580-2012**

Кабинеты: Диагностика Гинекология Лаборатория Вакцинация  
(нужное подчеркнуть)

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_  
(Заполняется производителем)

Подпись ответственного \_\_\_\_\_

М.П.

Приобретен \_\_\_\_\_  
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата, подпись, № акта ввода в эксплуатацию)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись и печать руководителя ремонтного предприятия)

\_\_\_\_\_  
(подпись и печать руководителя учреждения владельца)

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства ПМК-48415. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок В.1, Рисунок В.2)

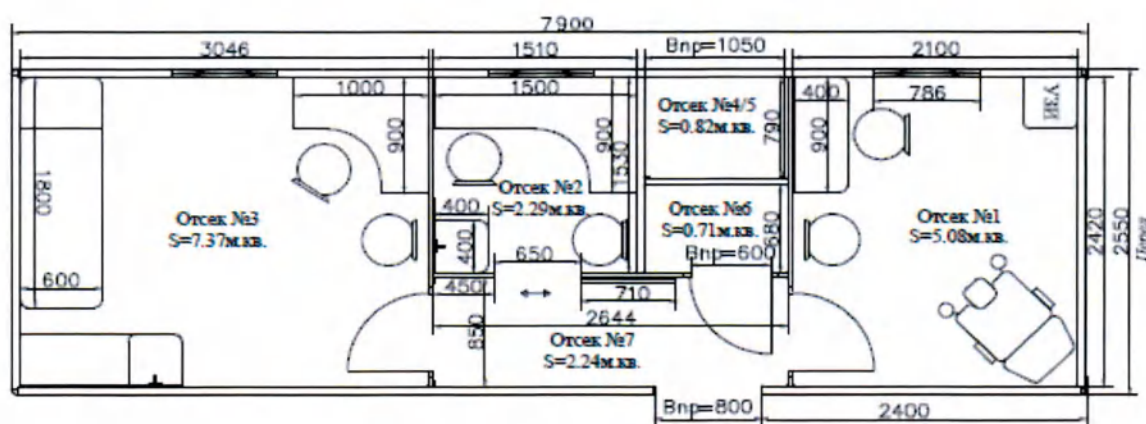
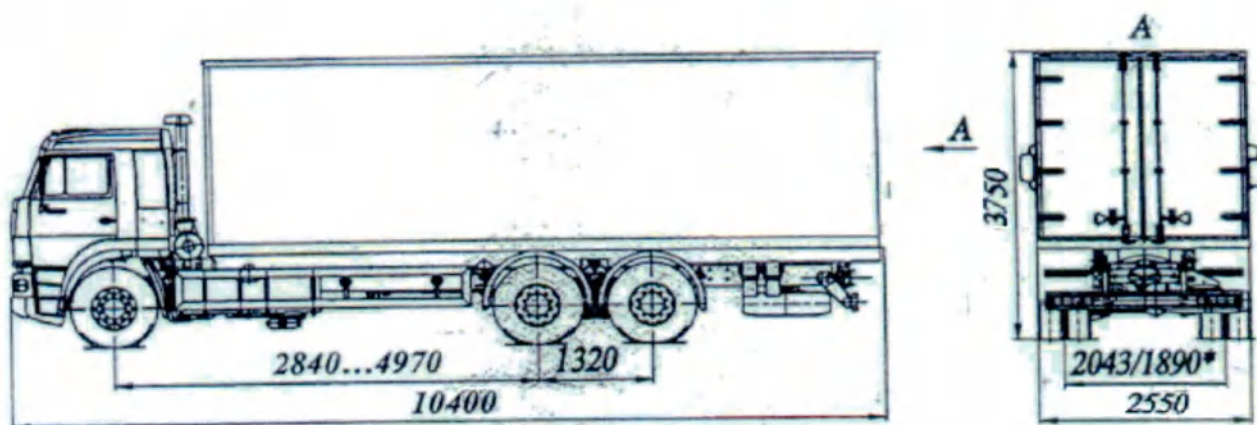


Рисунок В.1 Планировка 1

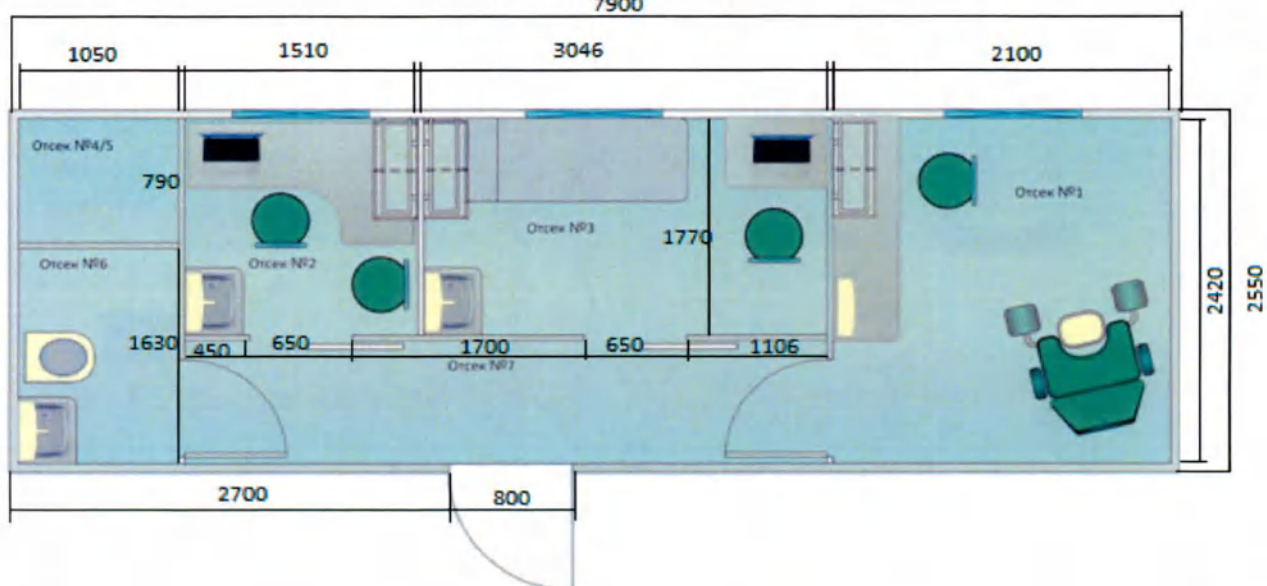


Рисунок В.2 Планировка 2

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)

5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства ПМК-5756С0-2. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок В.3, Рисунок В.4)

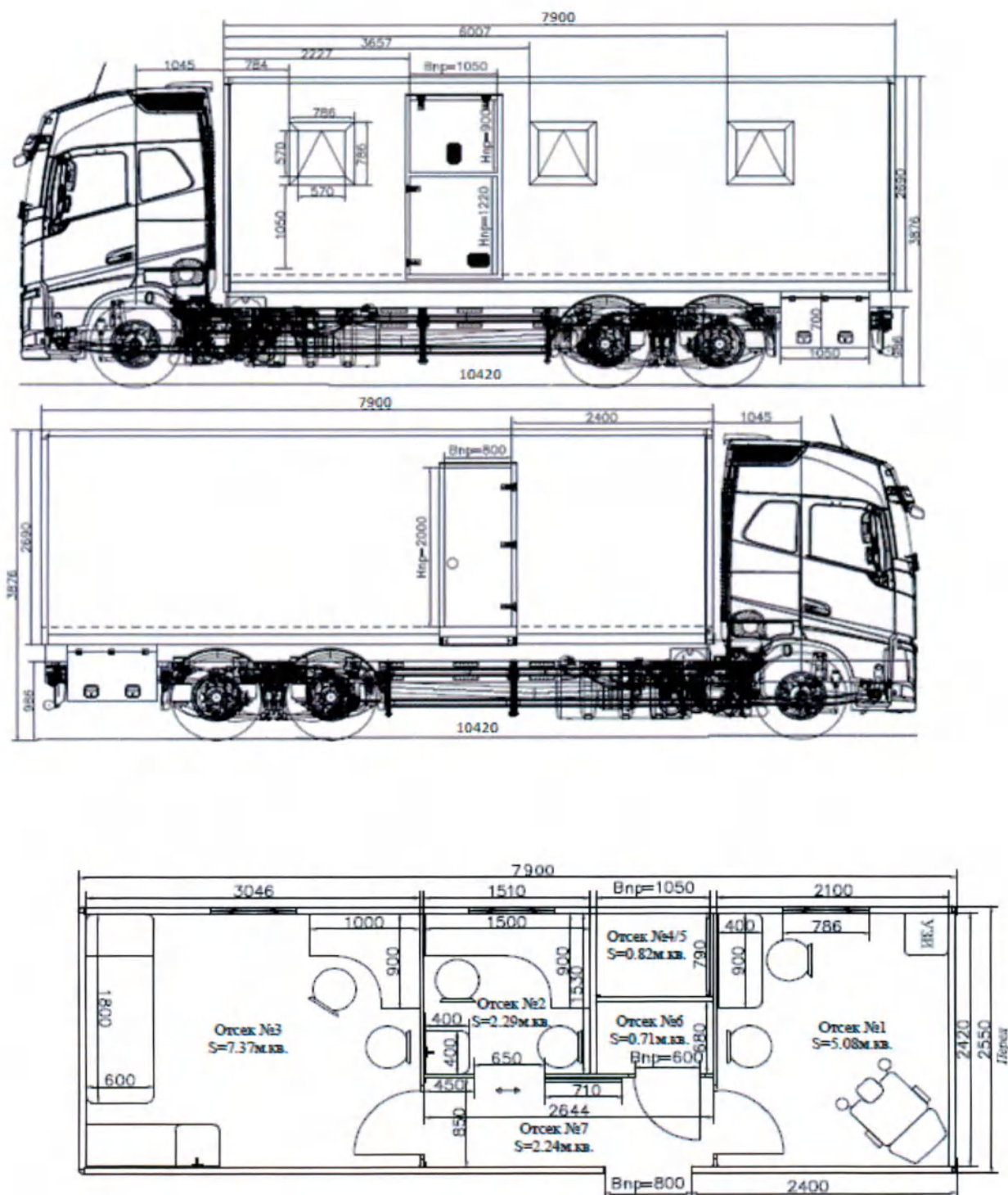


Рисунок В.3 Планировка 1

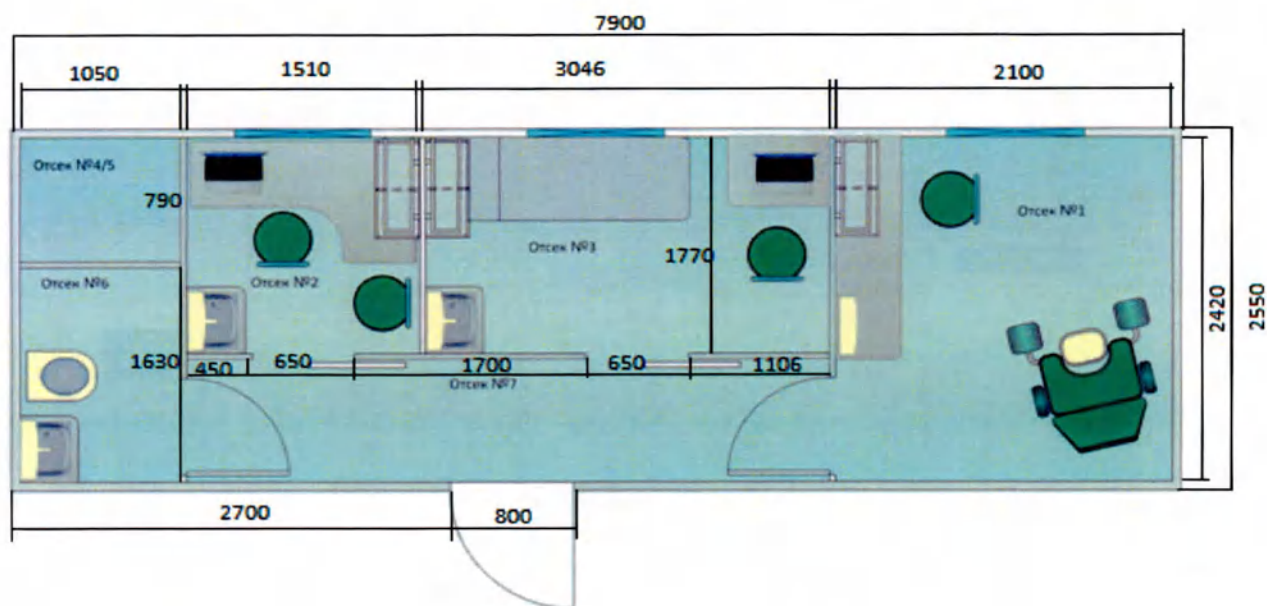


Рисунок В.4 Планировка 2

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства АЛ-59860С-2. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок В.5, Рисунок В.6)

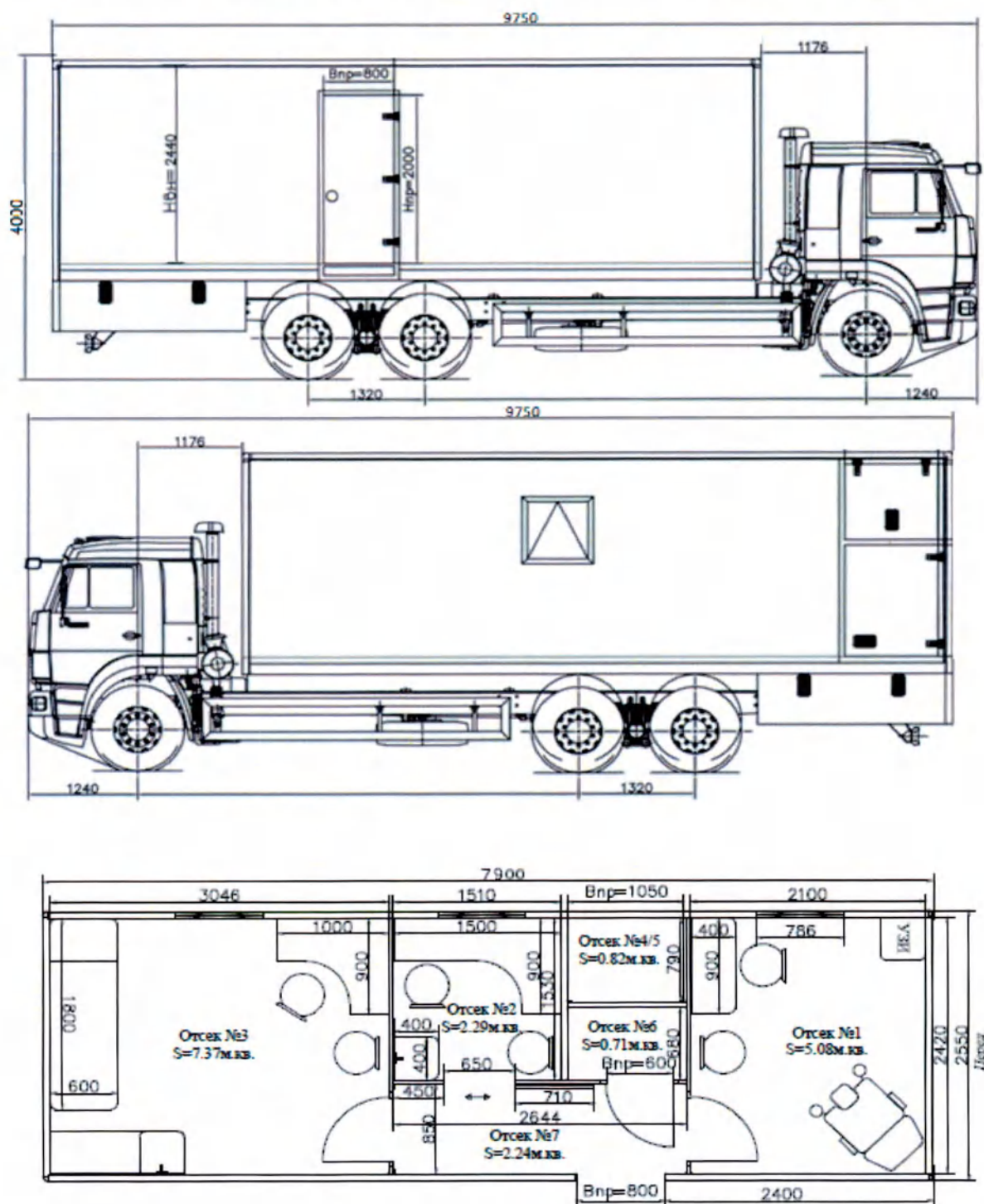


Рисунок Б.5 Планировка 1

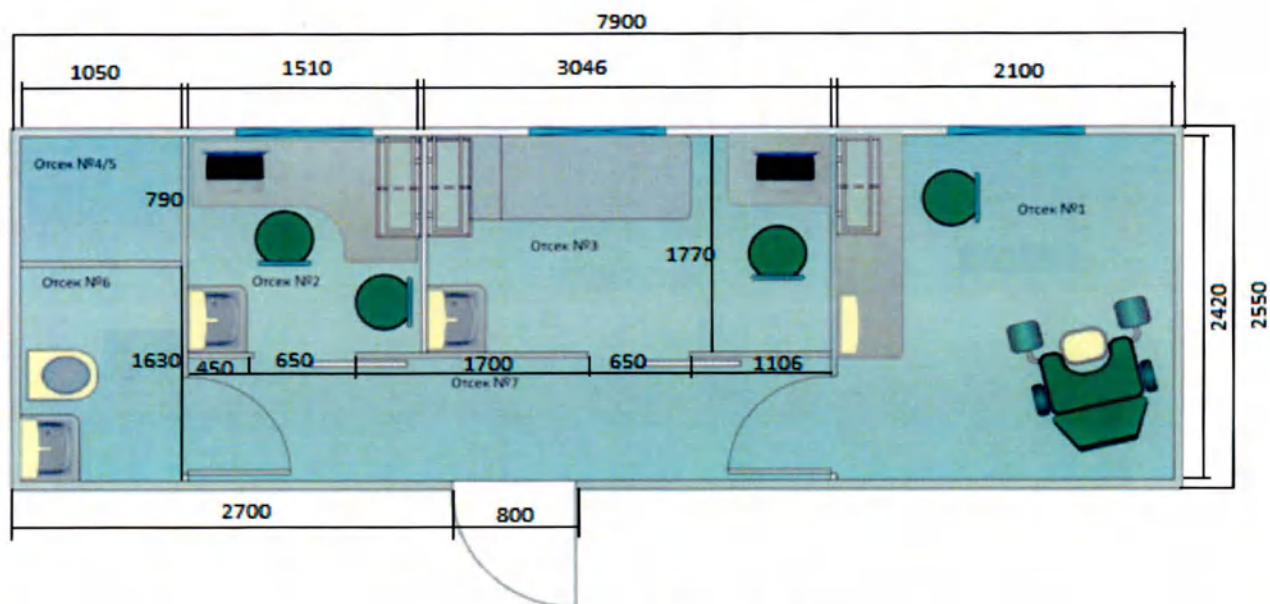


Рисунок В.5 Планировка 2

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства 8724. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок В.7, Рисунок В.8)

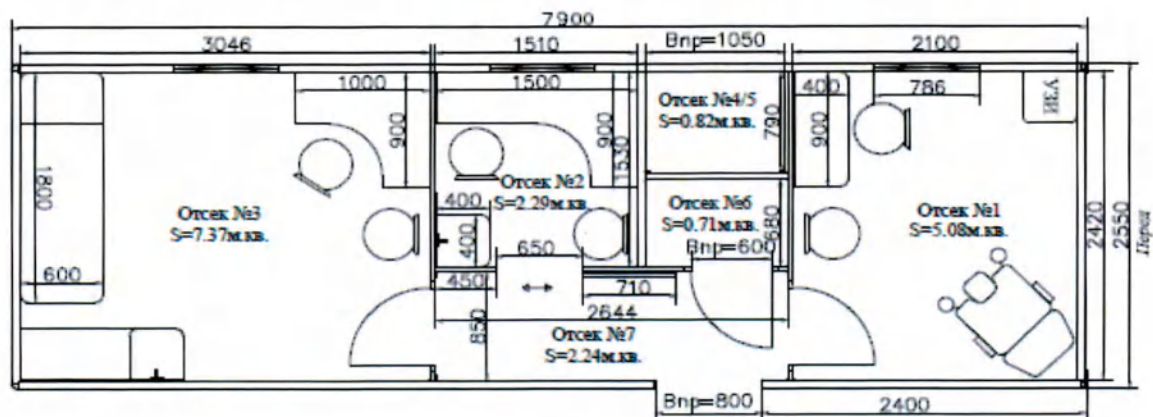


Рисунок В.7 Планировка 1

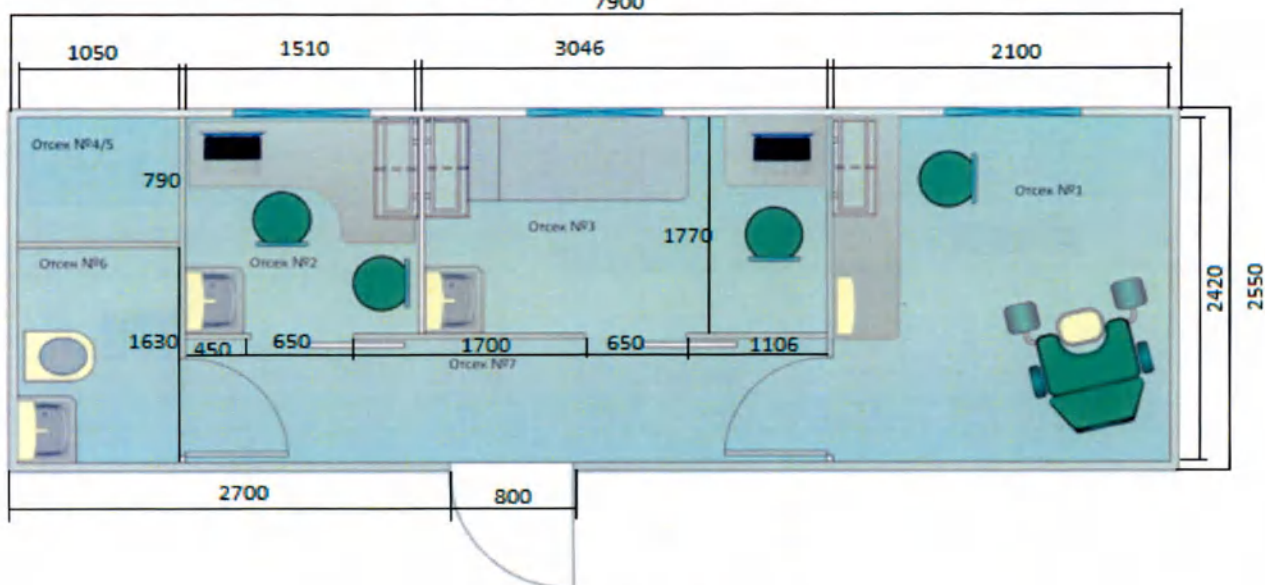


Рисунок В.8 Планировка 2

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Гинекология» (Рисунок В.9)

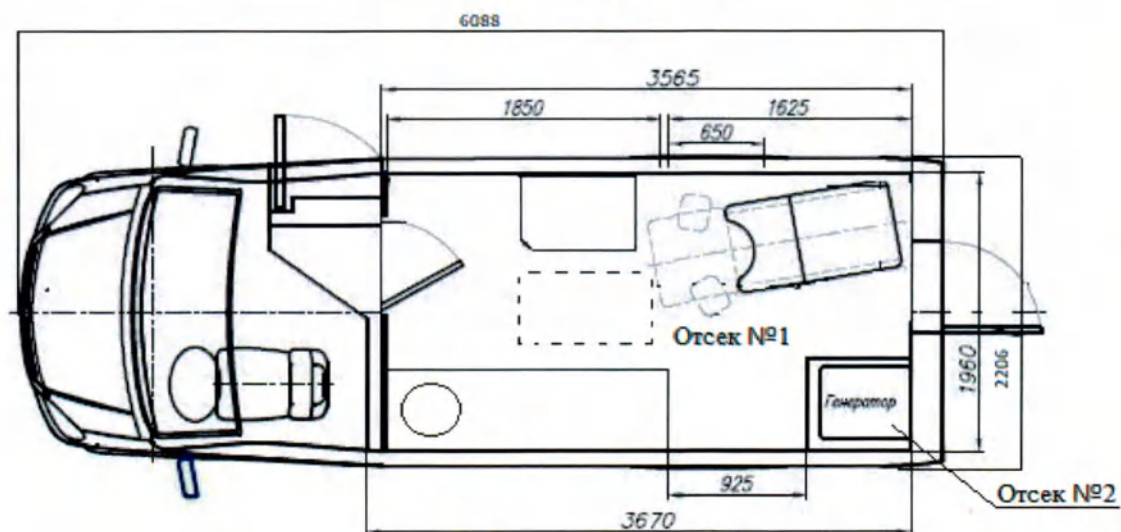
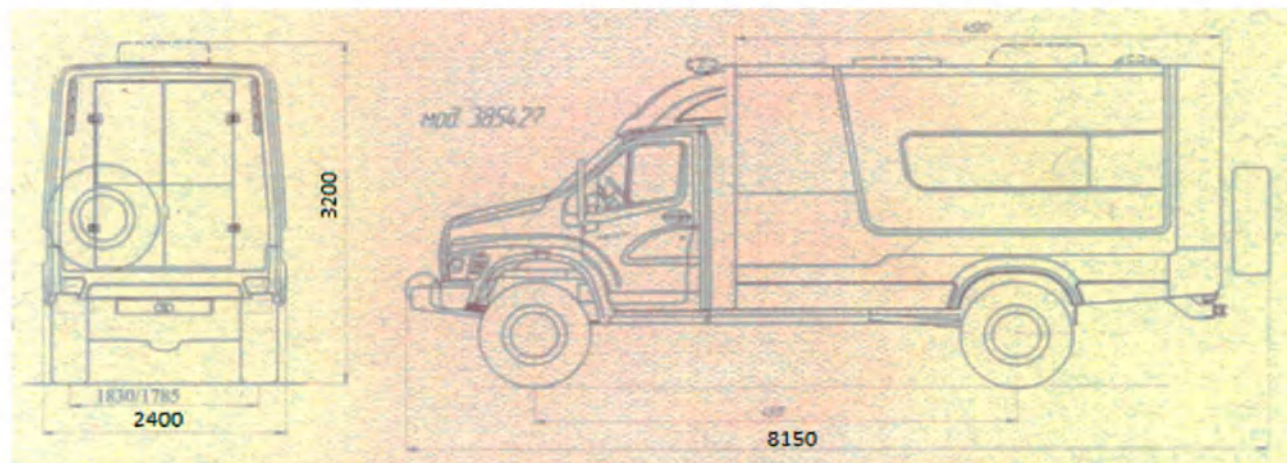


Рисунок В.9

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 385427. В составе кабинетов «Диагностика, «Гинекология» (Рисунок В.10)





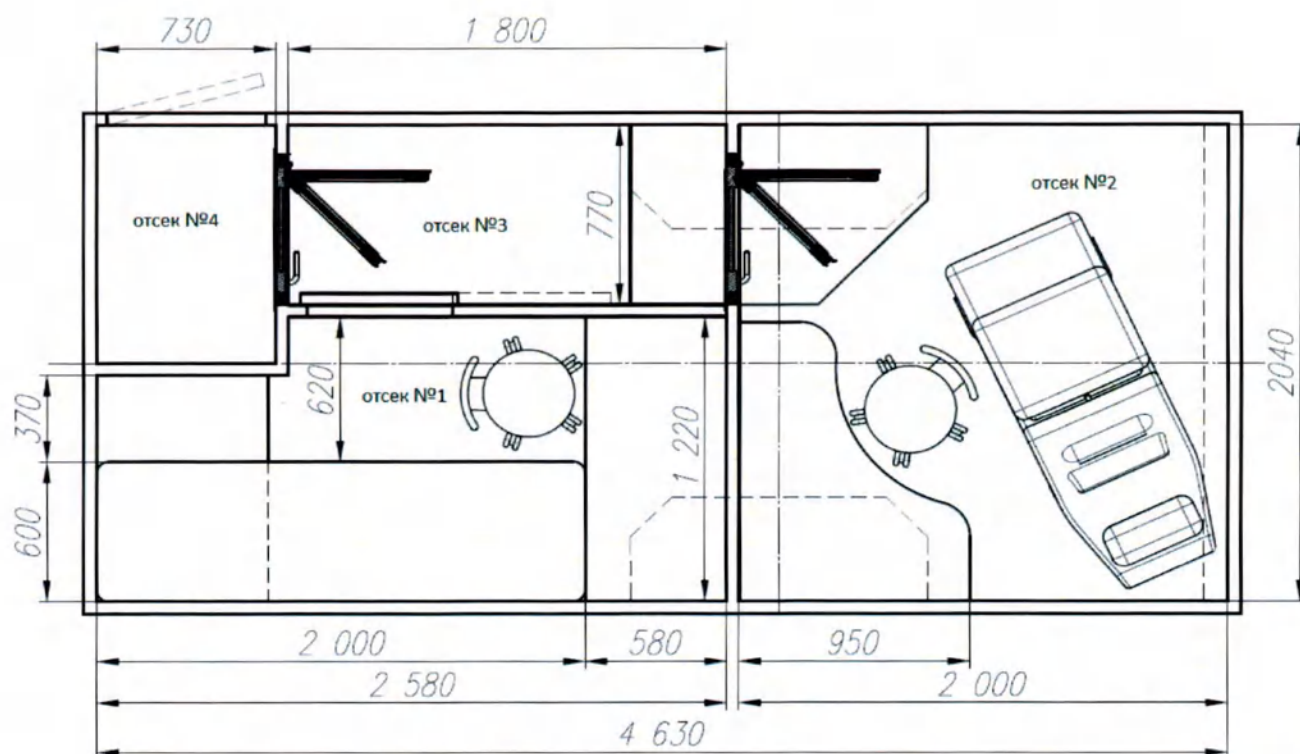


Рисунок В.10

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Кабинет (Гинекология), (высота помещения = 1950)
3. Коридор, (высота помещения = 1950)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)


Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 385527. В составе кабинетов «Диагностика, «Гинекология» (Рисунок В.11)

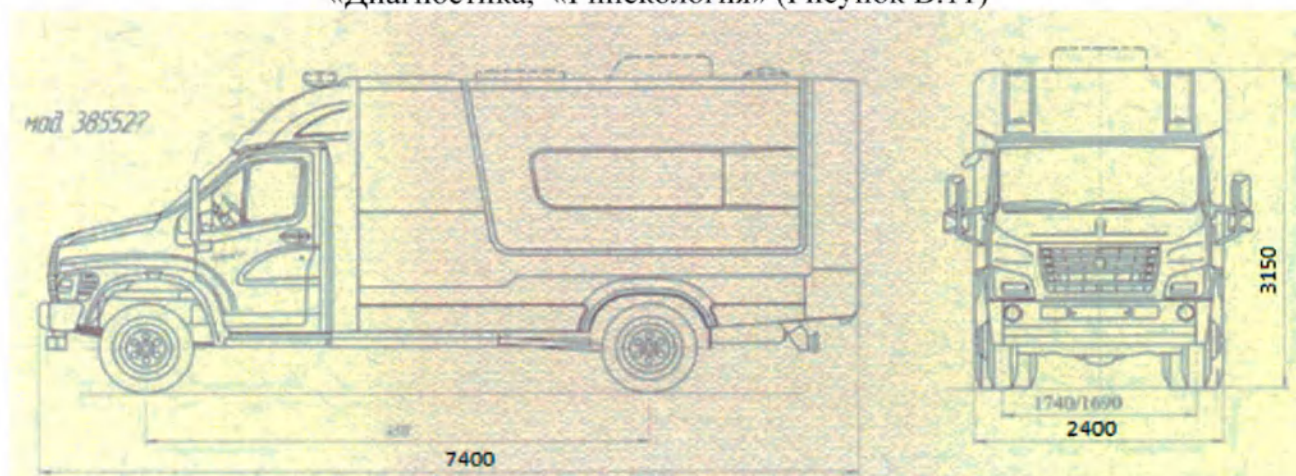

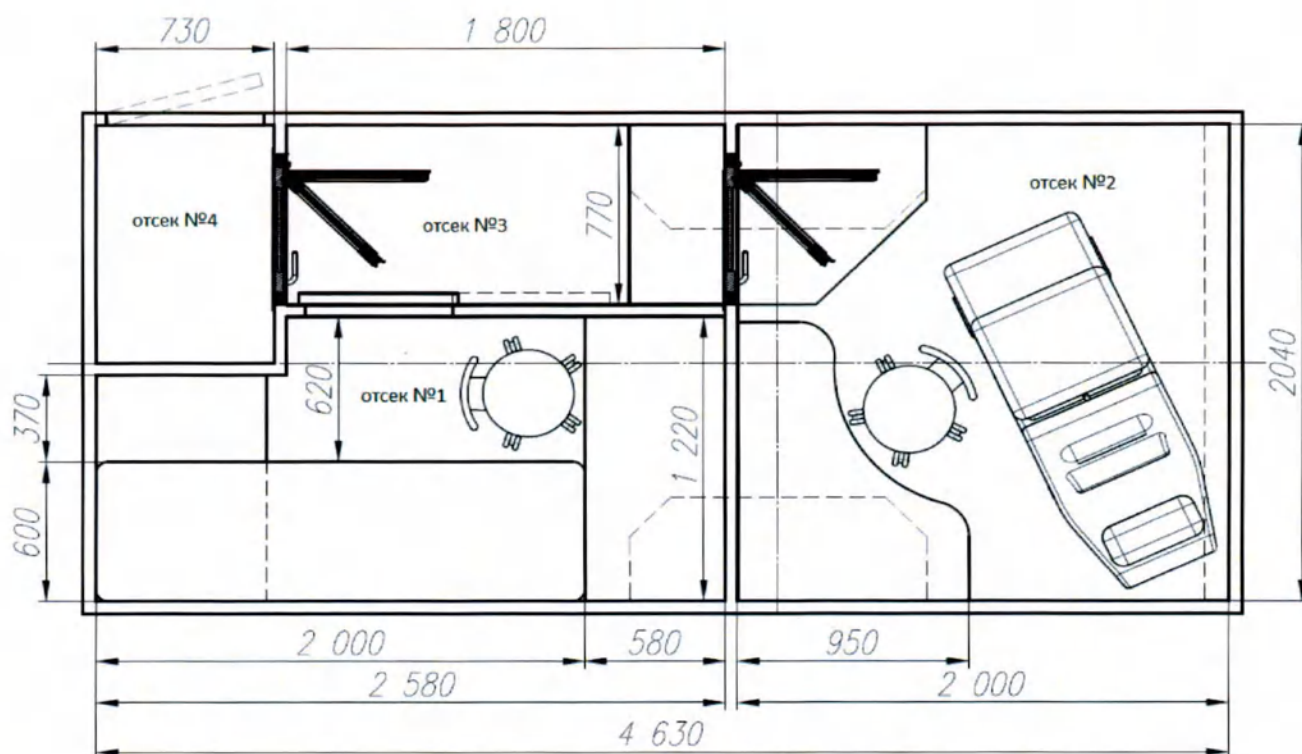

- 1 Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
- 2 Кабинет (Гинекология), (высота помещения = 1950)
- 3 Коридор, (высота помещения = 1950)
- 4 Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Гинекология» (Рисунок В.12)

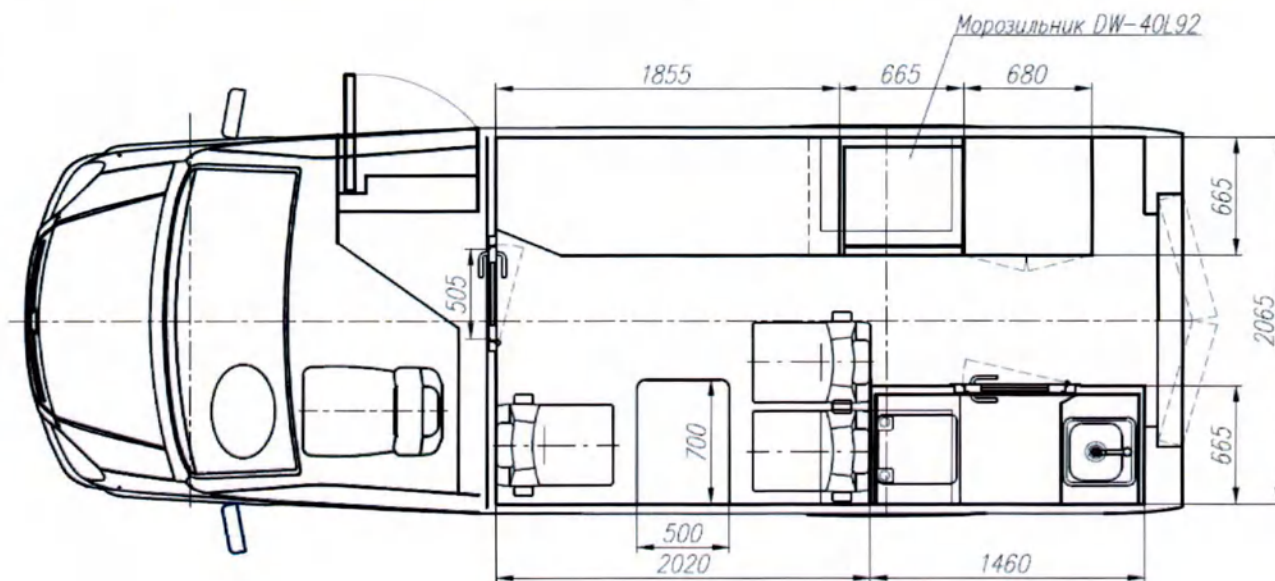

- Рисунок В.12
1. Кабинет (Вакцинация), (высота помещения = 1950)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Диагностика», «Предрейсовый и послерейсовый осмотр» (Рисунок Б.13)

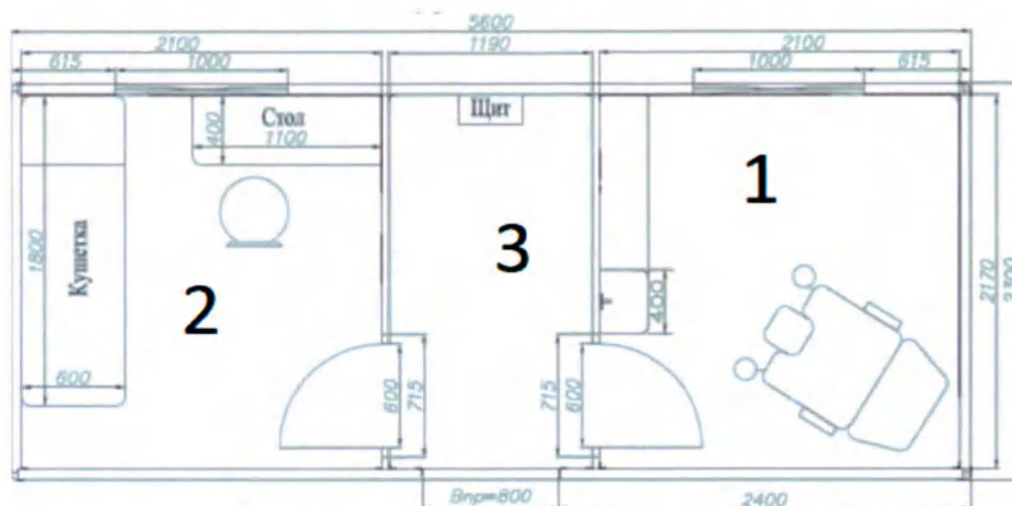


Рисунок Б.13

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения =2000)
2. Кабинет (Предрейсовый и послерейсовый осмотр), (высота помещения =2000)
3. Коридор, (высота помещения =2000)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», кабинет «Вакцинация» (Рисунок Б.14)

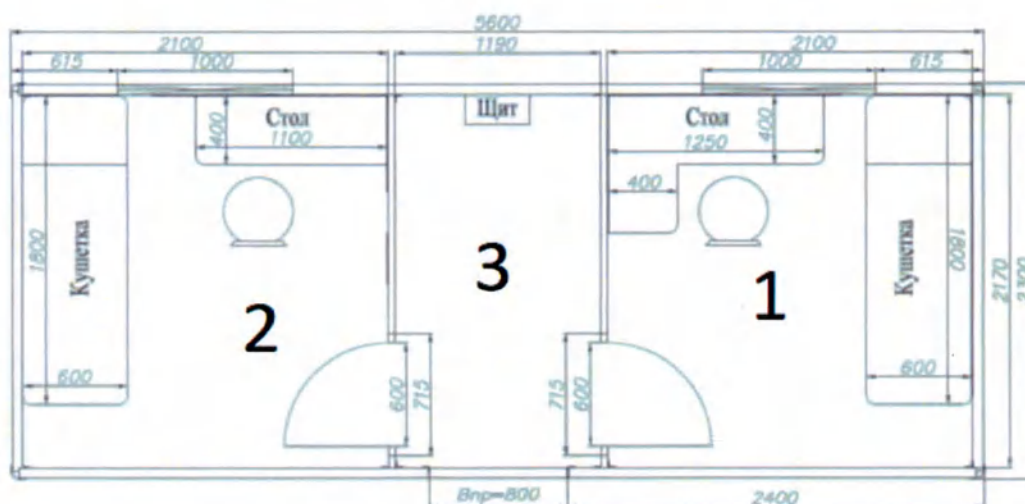


Рисунок Б.14

1. Кабинет (Вакцинация), (высота помещения =2000)
2. Кабинет (Передвижной пункт медицинского освидетельствования), (высота помещения =2000)
3. Коридор, (высота помещения =2000)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплекс на базе транспортных средств ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок Г.1, Рисунок Г.2)

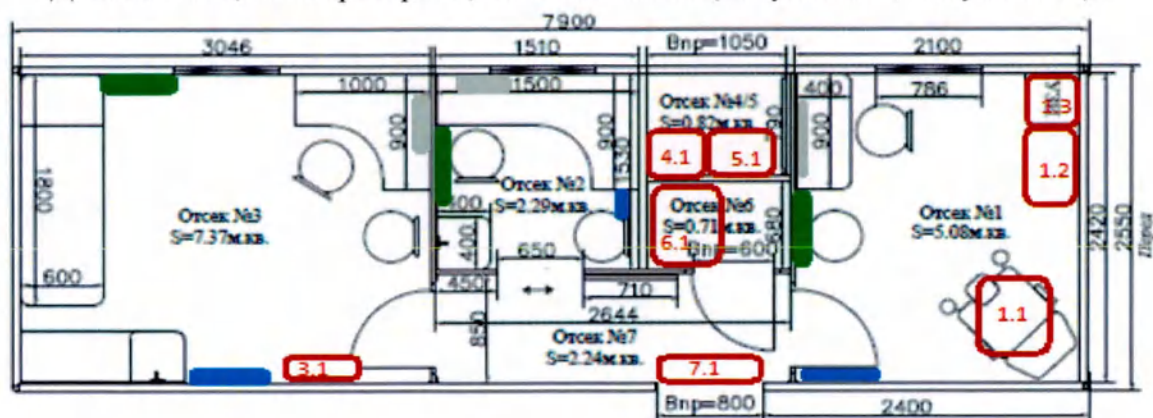


Рисунок Г.1

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - гинекологическое кресло;

1.2 - кольпоскоп;

1.3 - аппарат ультразвуковой диагностический;

2.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;

4.1 - электрогенераторная установка;

5.1 - блок кондиционера.

6.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

7.1 - промышленная воздушная завеса;

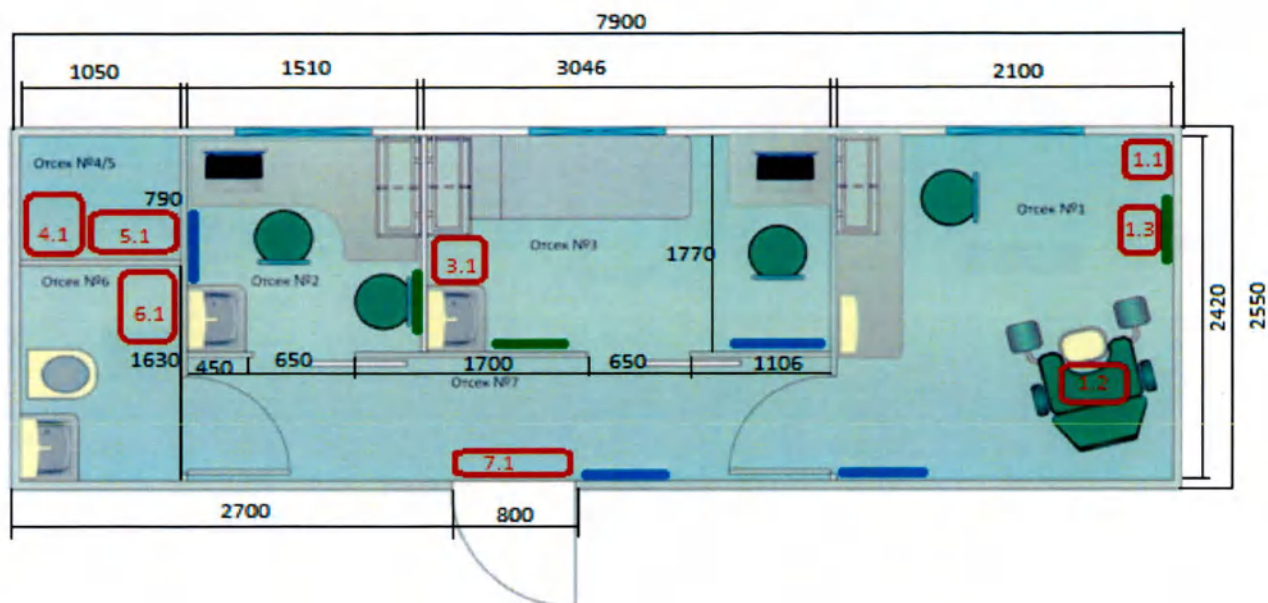


Рисунок Г.2

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

1.2 - гинекологическое кресло;

1.3 - кольпоскоп

3.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;

4.1 - электрогенераторная установка;

5.1 - блок кондиционера.

6.1 - multifunctional автономный преобразователь энергии.

7.1 - промышленная воздушная завеса;

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Гинекология» (Рисунок Г.3)

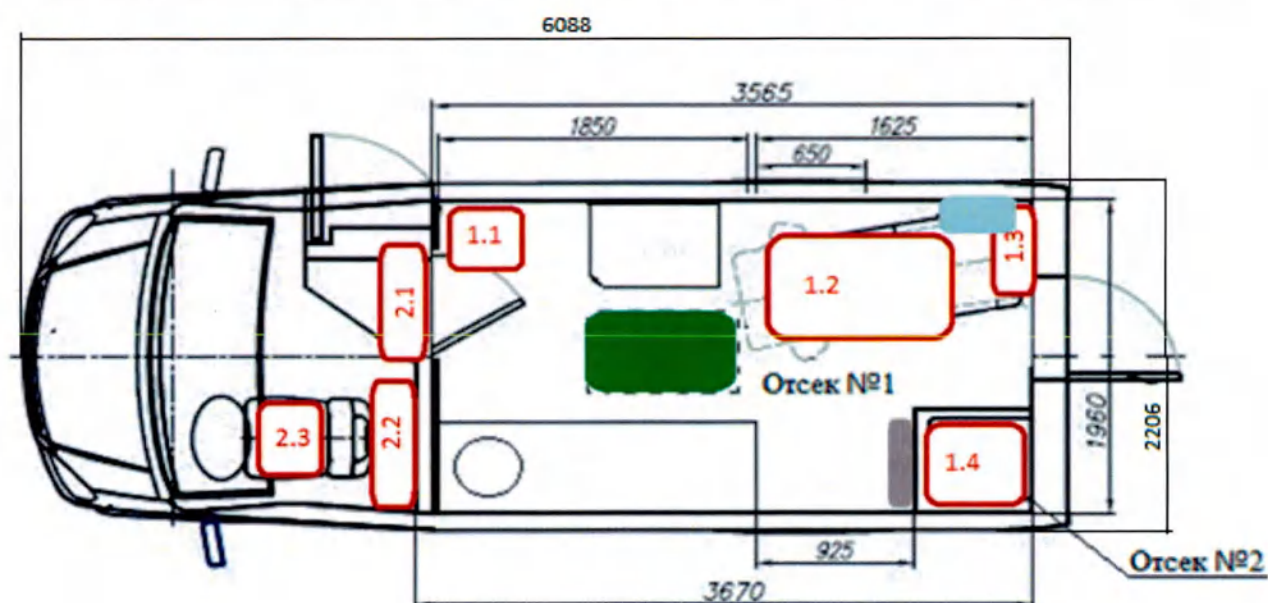


Рисунок Г.3.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - весы напольные;

1.2 - гинекологическое кресло;

1.3 - прибор приемно-контрольный охранный;


1.4 - электрогенераторная установка;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

2.2 - воздушный отопитель;

2.3 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортного средства 385427,385527. В составе кабинетов «Диагностика», «Гинекология»  
(Рисунок Г.4)

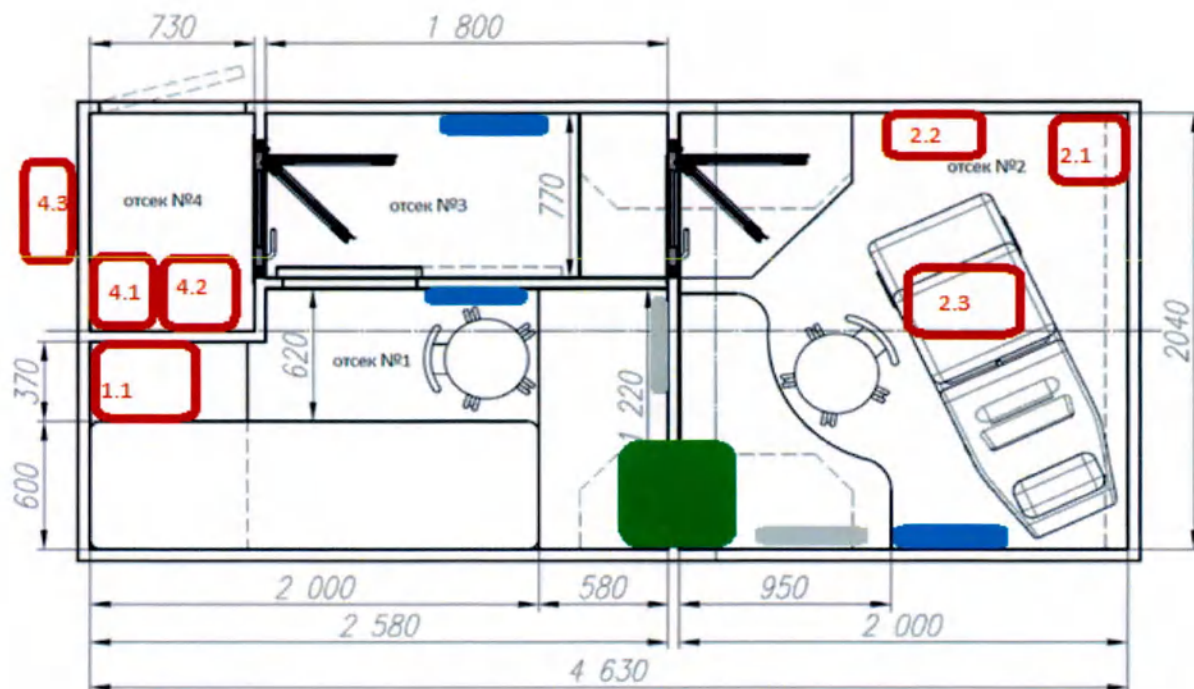

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - холодильник;

2.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

2.2 - весы напольные;

2.3 - гинекологическое кресло;

4.1 - электрогенераторная установка;

4.4 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

4.3 – внешний блок кондиционера

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Вакцинация» (Рисунок Г.5)

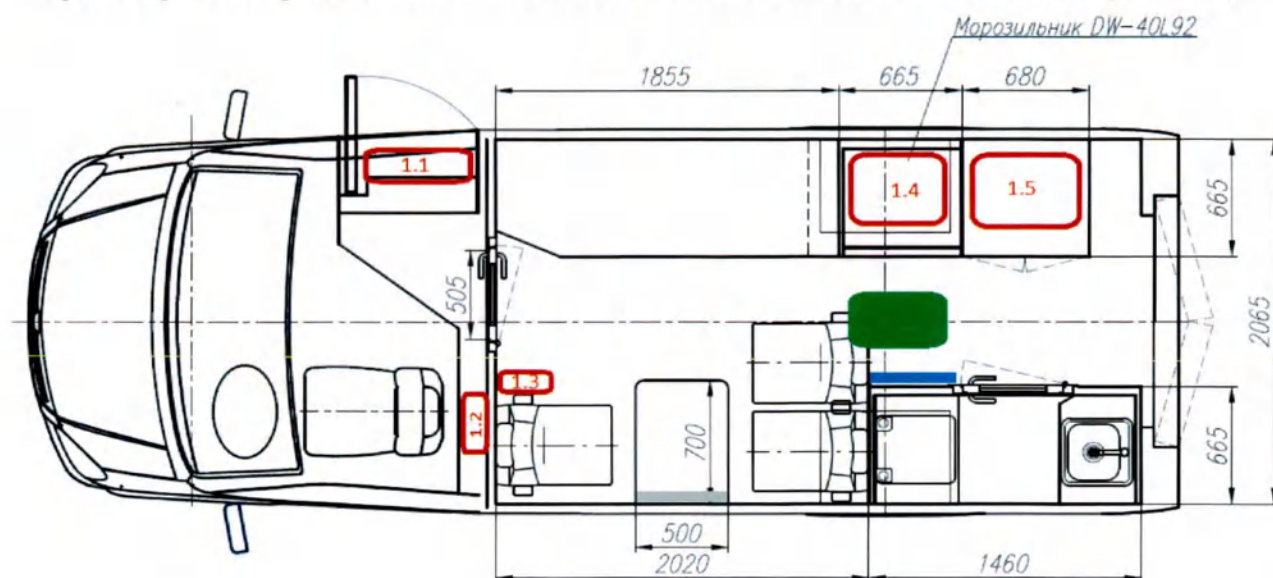


Рисунок Г.5

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 – воздушная завеса;


1.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

1.3 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.4 - морозильник;

1.5 - электрогенераторная установка.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Диагностика», «Предрейсовый и послерейсовый осмотр»

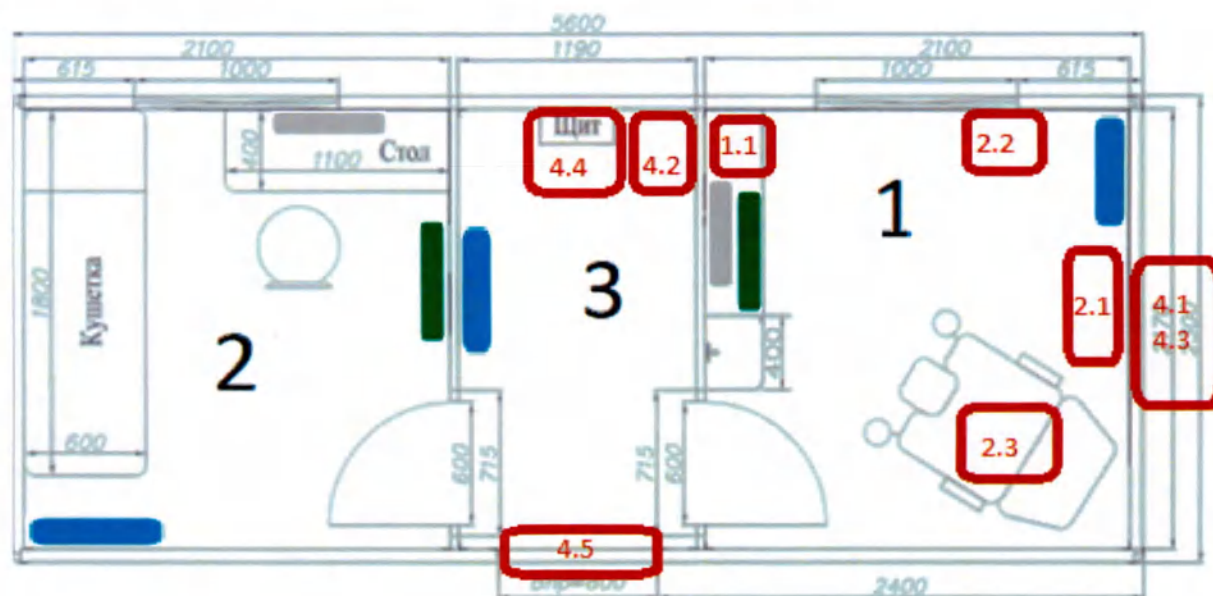

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 – автономный отопитель;

2.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

2.2 - весы напольные;

2.3 - гинекологическое кресло;

4.1 - электрогенераторная установка;


4.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

4.3 – внешний блок кондиционера

4.4 – электрический щит

4.5 – тепловая завеса

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», кабинет «Вакцинация»

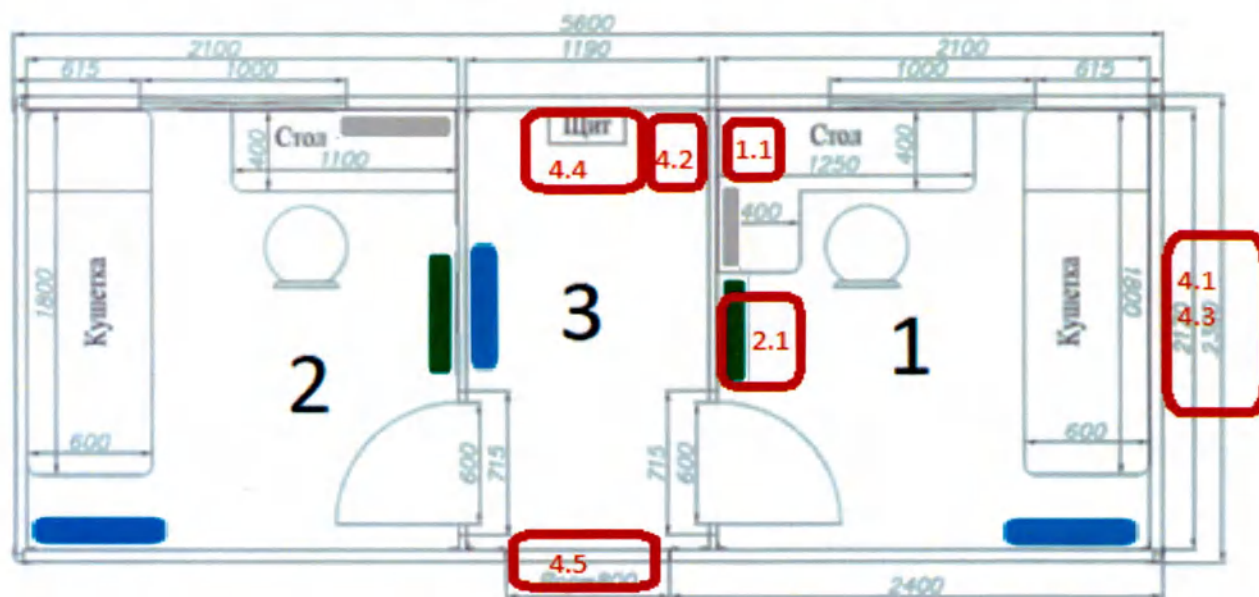

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 – автономный отопитель;

2.1 – медицинский морозильник;

4.1 - электрогенераторная установка;

4.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

4.3 – внешний блок кондиционера

4.4 – электрический щит

4.5. – Тепловая завеса

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

44 (срок годности)

листов

Генеральный директор  
подпись Горобец С.А.



**КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ  
(ЦЕНТР ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ)  
по ТУ 9451-008-37600580-2012**

**Руководство по эксплуатации**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

**О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ**

**ВВЕДЕНИЕ**

**ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОМПЛЕКСЕ**

**1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

**1.1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКСА**

**1.1.1. Назначение**

**1.1.2. Показания к применению**

**1.1.3. Противопоказания**

**1.1.4. Технические характеристики**

**1.1.5. Устройство и работа**

**2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

**2.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

**2.1.1 Требования безопасности**

**2.1.2 Выбор места и стоянка Комплекса**

**2.1.3 Сборка трапа:**

**Вариант трапа 1**

**Вариант трапа 2**

**2.1.4 Подключение к электропитанию**

**2.1.5 Освещение**

**2.1.6 Системы жизнеобеспечения**

**2.1.7 Медицинское и другое оборудование Комплекса**

**2.1.7.1 Транспортное и рабочее положение оборудования и мебели**

**2.1.7.2 Крепление мебели при транспортном положении**

**2.1.7.3 Пример транспортного расположения и крепления медицинского оборудования**

**2.2 ПОДГОТОВКА И ПРИВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

**2.2.1 Подготовка**

**2.2.2 Приведение Комплекса в транспортное положение**

**3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

**4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

**5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА.**

**6. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ**

**7. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

**8. УТИЛИЗАЦИЯ**

**9. РЕКЛАМАЦИЯ**

**10. СПИСОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ**

**Приложение 1. Габаритные размеры оборудования устанавливаемого в комплексе.**

**Приложение 2. Назначение медицинских изделий и специального оборудования, используемых в Комплексе**

**Приложение 3. Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе.**

**Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)**

**Указания и декларация соответствия Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала**

## О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Руководство описывает Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) (далее – Комплекс) по ТУ 9451-008-37600580-2012

Комплект документации при поставке (на русском языке):

- Руководство по эксплуатации на Комплекс
- Паспорт на Комплекс
- Эксплуатационные документы на всё медицинское и специальное оборудование в комплекте с изделием, входящих в состав Комплекса

В данном руководстве для обозначения потенциально опасной или способной причинить вред ситуации или процедуры, а так же для указания на ситуацию или действия, представляющие опасность для пациента и/или пользователя, используется выделение текста красным цветом.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!**

Испытание электромагнитной совместимости Комплекса было произведено в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Комплекс НЕ является источником электромагнитных помех и НЕ требует применения специальных мер, для обеспечения электромагнитной совместимости

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание риска поражения электрическим током, Комплекс должен быть подключен только к сети питания с защитным заземлением.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и работой Комплекса мобильного (центр лечебно-профилактический передвижной) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

При изучении и эксплуатации изделия, необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационной документацией на медицинское и специальное оборудование, эксплуатационную документацию на базовое транспортное средство и изотермический фургон, входящее в комплект документации при поставки.

Работы по вводу в эксплуатацию, контролю технического состояния, ремонту и техническому обслуживанию Комплекса должны выполняться квалифицированными специалистами.

**ВНИМАНИЕ! Изделие, при определенных условиях, может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Источники опасности:**

- бортовая электросеть и электрооборудование - опасность поражения людей электрическим током;
- нагревательные приборы - пожаробезопасность, термические ожоги;
- падение с трапа.

**Залогом безопасной и безаварийной работы является соблюдение правил работы и работа только на исправном и неповрежденном оборудовании.**

В случае возникновения каких-либо затруднений, проблем или просьб, просьба обращаться в ЗАО «НПО «МЕДКАР»:

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

Адрес производства: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 10

Телефон: +7(495) 540-45-96, e-mail: [med@medcar.ru](mailto:med@medcar.ru)

## ЗНАКИ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В КОМПЛЕКСЕ

| ЗНАК                                                                              | ЗНАЧЕНИЕ                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Знаки I и O на электрошите – включение (ON) и выключение (OFF) соответственно. |
|  | Заземление.                                                                    |
|  | Осторожно! Высокое напряжение!                                                 |
|  | Изготовитель.                                                                  |
|  | Дата изготовления.                                                             |

## **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

### **1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКСА**

#### **1.1.1 Назначение**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и работой Комплекса мобильного (центр лечебно-профилактический передвижной). (далее Комплекс) предназначен для применения в медицинских целях при установке его по месту временной дислокации и не предназначен для применения в медицинских целях при перевозках или перемещении.

В зависимости от назначения и комплектации Комплекс оснащен следующими медицинскими кабинетами:

- Кабинет «Диагностика»;
- Кабинет «Гинекология»;
- Кабинет «Лаборатория».
- Кабинет «Вакцинация».
- Кабинет «Предрейсовый осмотр»;
- Кабинет «Передвижной пункт медицинского освидетельствования»

Транспортные средства ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724 по требованию заказчика могут поставляться с двумя видами планировок, приведенных в рисунках 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д: «планировка 1», «планировка 2».

На базе транспортного средства ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724 размещаются кабинеты «Диагностика», «Гинекология», «Лаборатория».

На базе транспортного средства 185514 размещается кабинет «Гинекология» или «Вакцинация».

На базе транспортного средства 385427, 385527 размещаются кабинеты «Гинекология», «Диагностика»

На базе транспортного средства «Диагностика», «Предрейсовый осмотр», «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», «Вакцинация».

#### **1.1.2 Показания к применению**

Комплекс показан к применению медицинскими организациями (иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности) независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими оказание гражданам первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, вакцинации населения.

### **1.1.3 Противопоказания**

Не допускается использования Комплекса не по назначению, перед применением необходимо ознакомиться с оригинальным руководством по эксплуатации на Комплекс и инструкциями (руководствами по эксплуатации), паспортами на все медицинские приборы и системы жизнеобеспечения в комплекте с изделием, входящими в состав документации на Комплекс.

### **1.1.4 Технические характеристики**

#### **А) Конструкция Комплекса**

Комплекс представляет собой фургон изотермический, или контейнер, или КУНГ (далее Кузов), состоящий из медицинских кабинетов (далее Кабинеты), коридора, генераторного отсека, отсека под внешний блок кондиционера и хозяйственного отсека (с возможностью размещения биотуалета).

#### **Б) Системы жизнеобеспечения**

Каждый Комплекс оснащается комплектом систем жизнеобеспечения:

1. системой электроснабжения от внешней сети электрического тока и автономных источников питания, таких как: генераторная установка, аккумуляторные батареи; преобразователь 24/220 (380) В, преобразователь 12/220 (380) В;
2. системой освещения 12/24 В, и 220/380 В;
3. системой водоснабжения;
4. системой автономного воздушного отопления;
5. системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
6. системой противопожарного оповещения с пультом управления, комплектом датчиков и звуковым извещателем.

## В) Паспортные данные

Наименование Комплекса, состав кабинетов; наименование шасси; обозначение ТУ; наименование предприятия-изготовителя; заводской номер; год изготовления указаны на идентификационной табличке, размером 15 см х 20 см (Рисунок 1), расположенной на входной двери в Комплекс в нижнем левом углу.

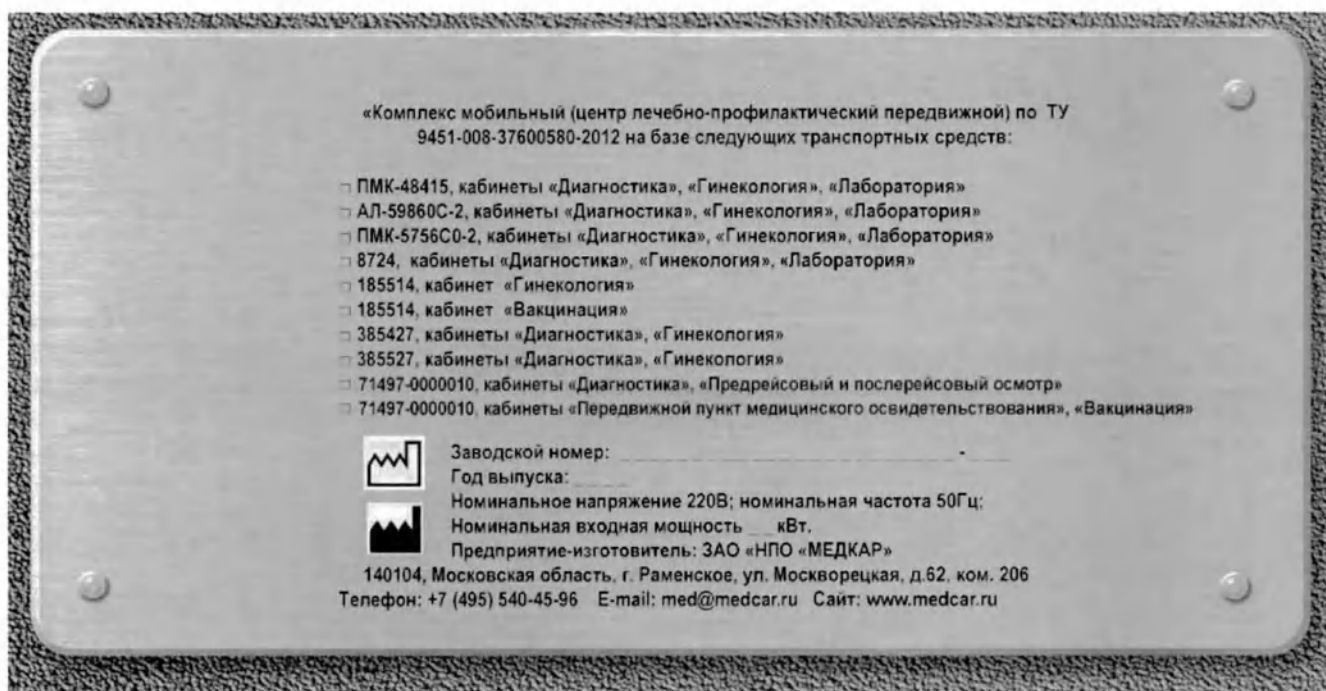


Рисунок 1. Идентификационная табличка Комплекса.

### 1.1.5 Устройство и работа

А) Комплекс представляет собой изотермический фургон (далее Кузов) со стационарно размещенным в нем медицинским и специальным оборудованием.

Б) Комплекс размещается в следующих транспортных средствах:

- ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724, 185514, 385427, 385527, 71497-0000010

В) Комплекс поставляется с несколькими комплектами ключей, в зависимости от транспортного средства и оснащения (Рисунок 2):




Рисунок 2. Комплекты ключей (возможные).


- 1 – крышка входного трапа, 2 – входная дверь (верхний замок),
- 3 – крышка топливного бака, 4 – замок зажигания, 5 – замки «подфургонных» боксов,
- 6 – запорные механизмы дверей генераторного и климатического отсеков,
- 7 – входная дверь (нижний замок), 8 – замки дверей кабины,
- 9 – замки «подкабинных» боксов.

Г) Двери Комплекса оснащены замками и открываются индивидуальными ключами. Ключи для инструментальных ящиков, боксов и технологических отсеков имеют номера, соответствующие номерам нанесенных на замках. Ключи от внутренних дверей отсеков и мебельных отсеков хранения, вставлены в замки и механизмы запираения.


Д) Комплекс разделен перегородками (Рисунки 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д, 3-Е, 3-Ж, 3-З):

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства ПМК-48415. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок 3-А)

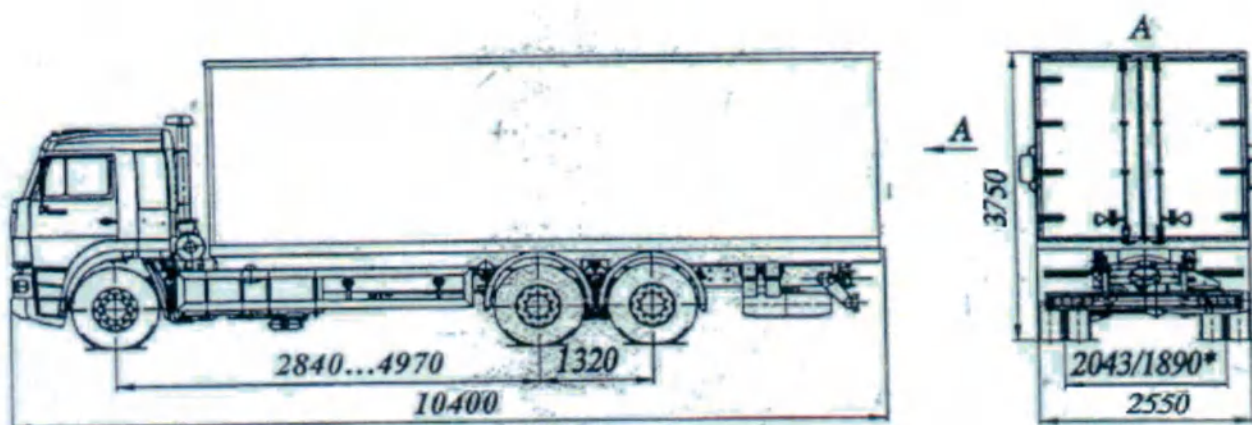

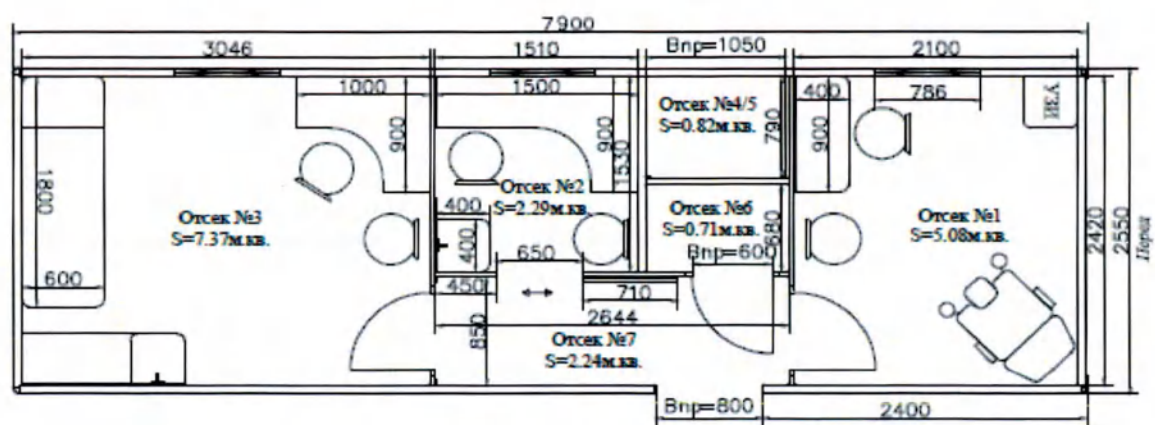

Планировка 1  
7900

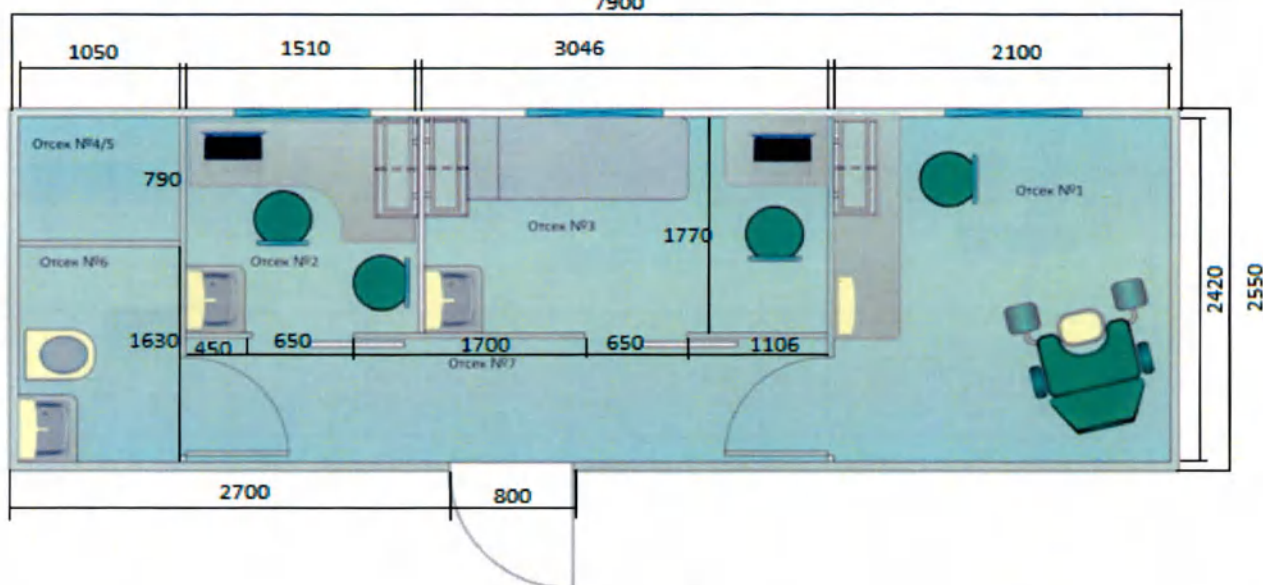


Планировка 2  
Рисунок 3-А

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства ПМК-5756С0-2. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок 3-Б)



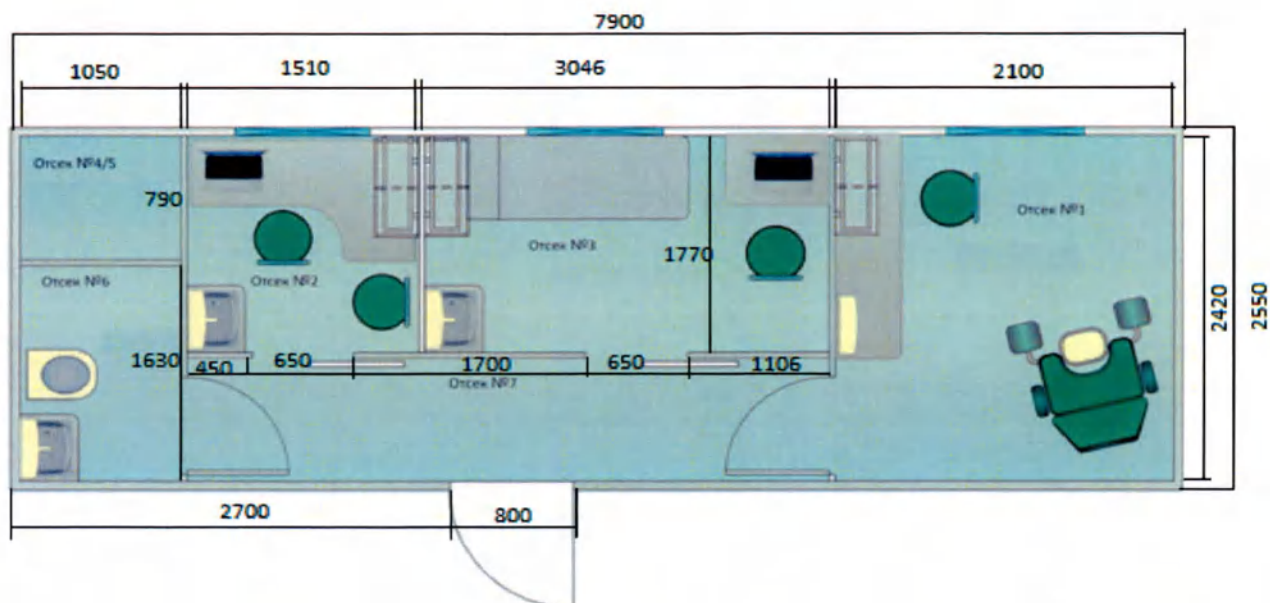


Планировка 2


Рисунок 3-Б

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства АЛ-59860С-2. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок 3-В)

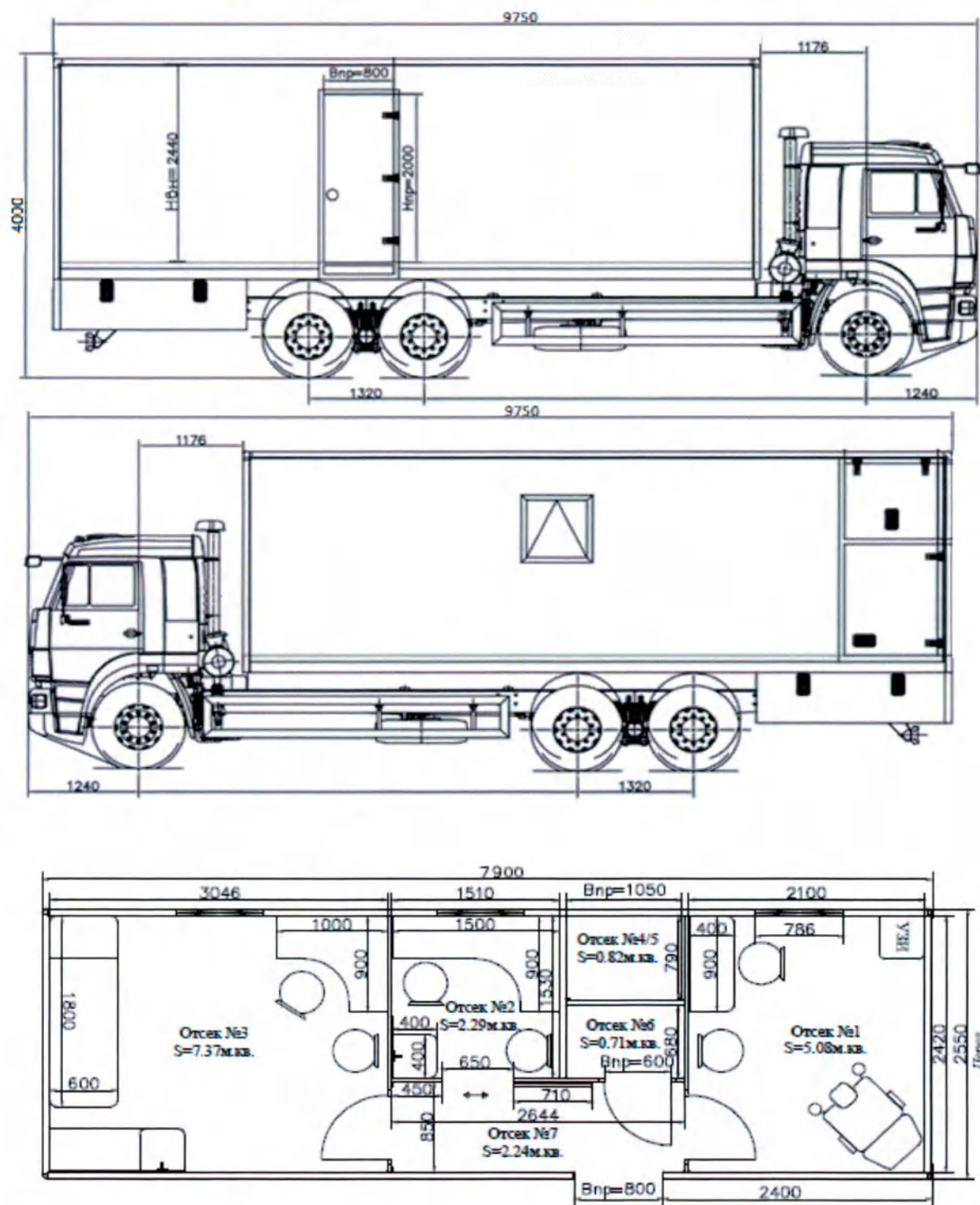

Планировка 1

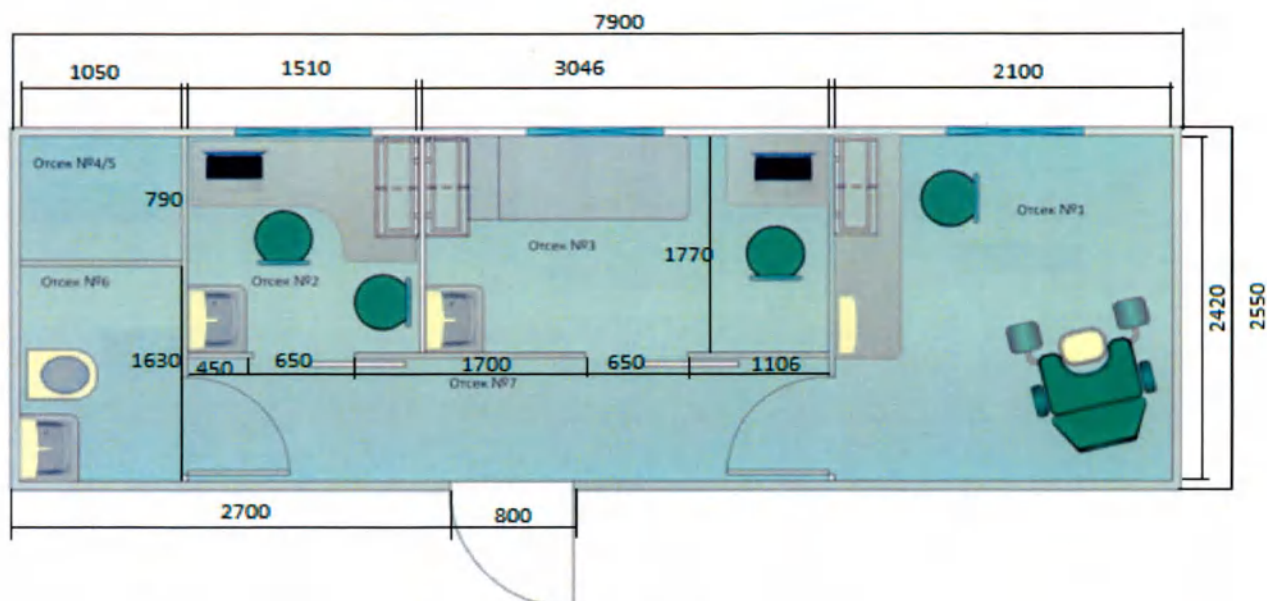


Планировка 2


Рисунок 3-В

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировок Комплекса на базе транспортного средства 8724. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок 3-Г)

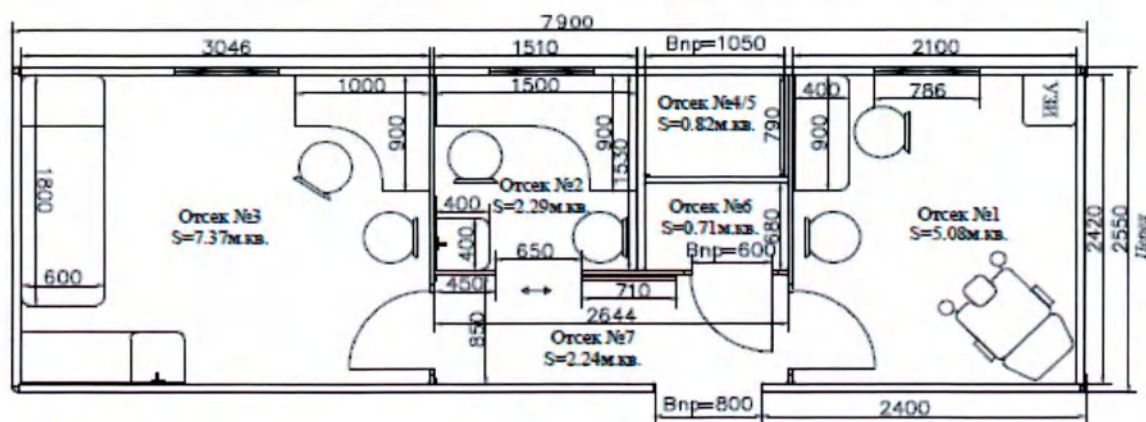

Планировка 1

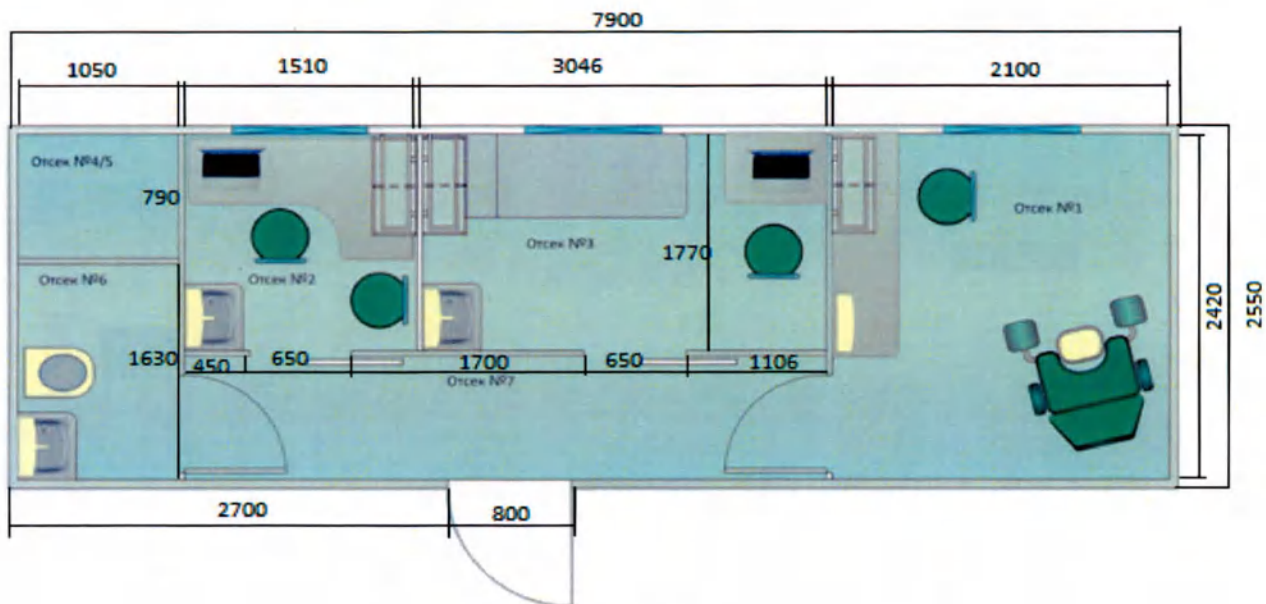

Планировка 2

Рисунок 3-Г

1. Кабинет 1 (Гинекология), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
6. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
7. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Гинекология» (Рисунок 3-Д)

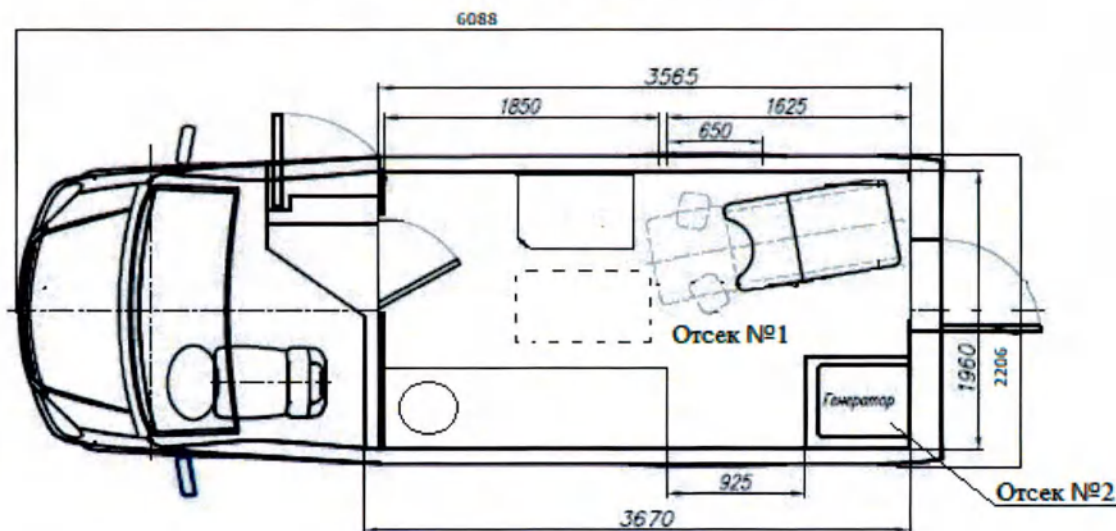
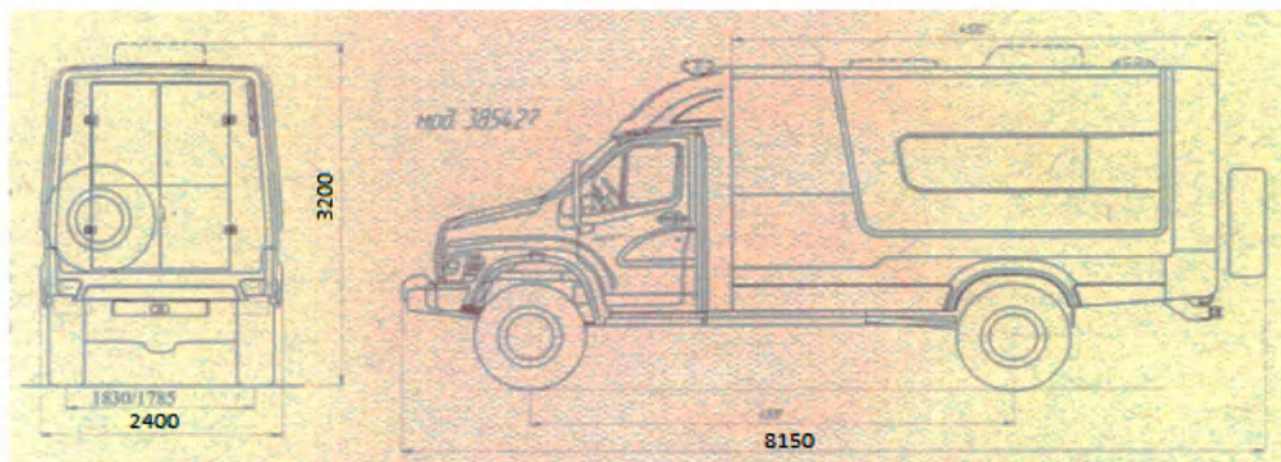


Рисунок 3-Д

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 385427. В составе кабинетов «Диагностика, «Гинекология» (Рисунок 3-Е)



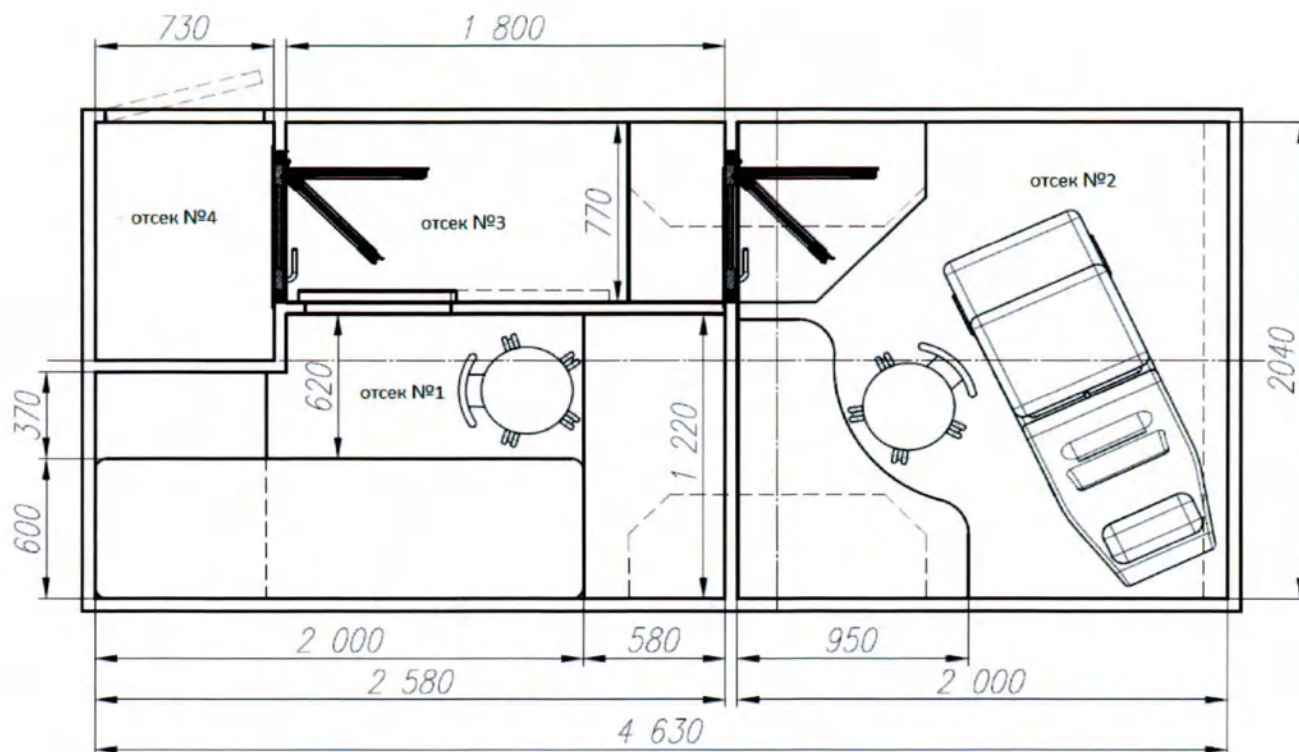
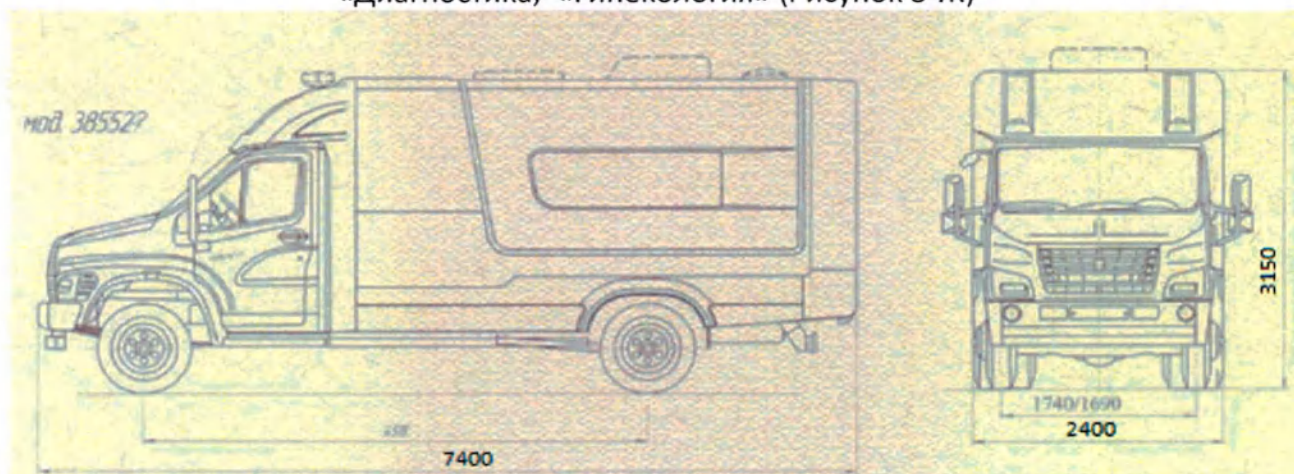


Рисунок 3-Е

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Кабинет (Гинекология), (высота помещения = 1950)
3. Коридор, (высота помещения = 1950)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 385527. В составе кабинетов «Диагностика», «Гинекология» (Рисунок 3-Ж)



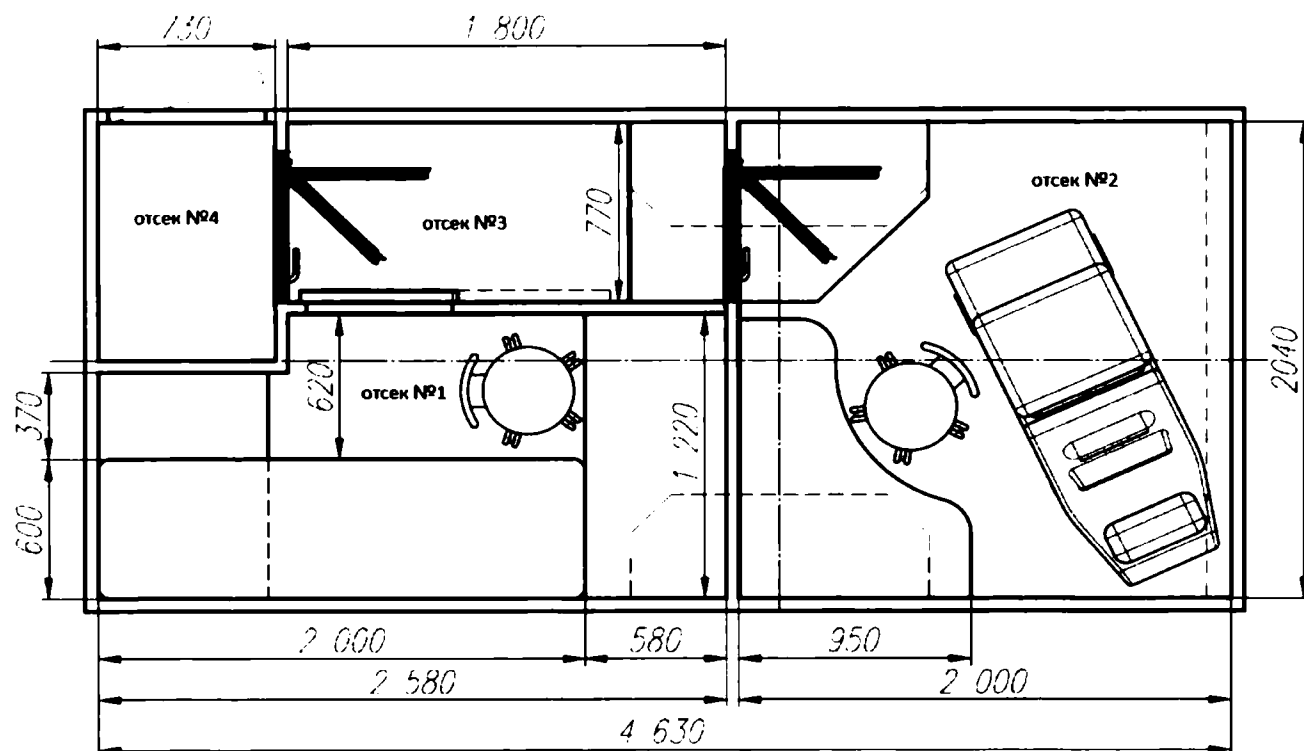


Рисунок 3-Ж

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Кабинет (Гинекология), (высота помещения = 1950)
3. Коридор, (высота помещения = 1950)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Вакцинация» (Рисунок 3-З)

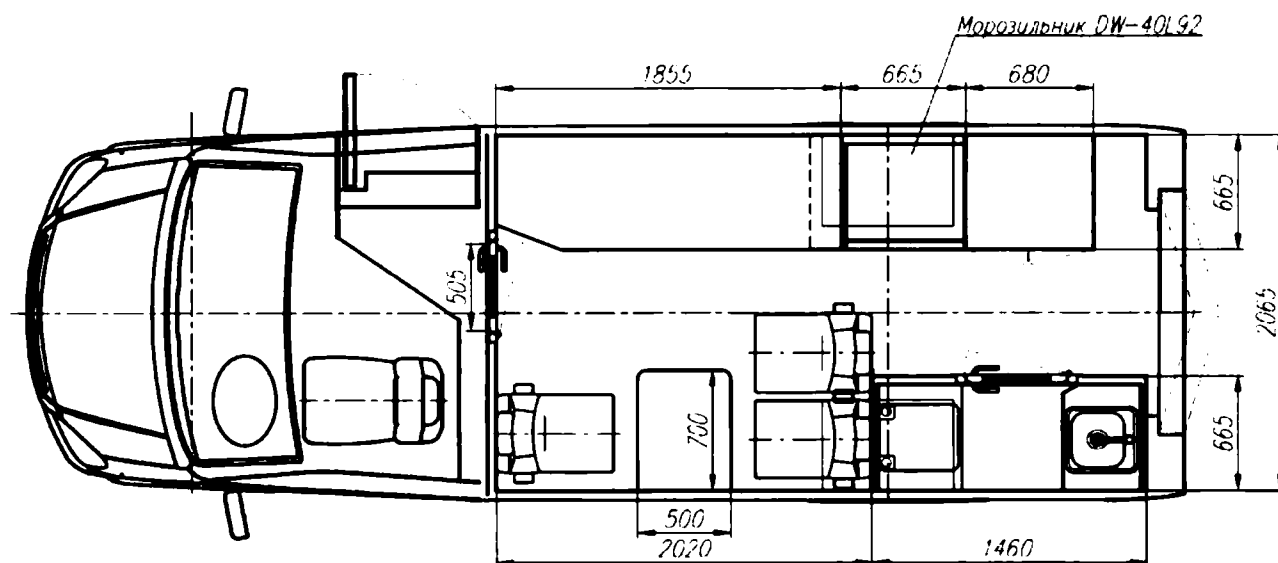


Рисунок 3-З

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Диагностика», «Предрейсовый и послерейсовый осмотр» (Рисунок 3-И)

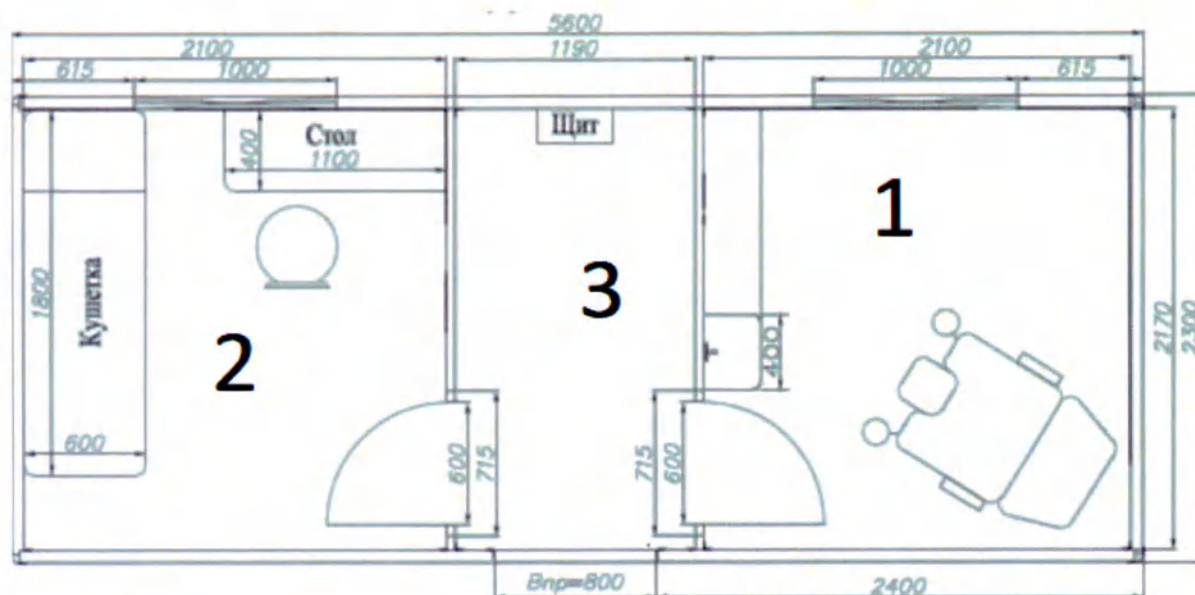


Рисунок 3-И

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения =2000)
2. Кабинет (Предрейсовый и послерейсовый осмотр), (высота помещения =2000)
3. Коридор, (высота помещения =2000)

Схема планировки Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», кабинет «Вакцинация» (Рисунок 3-К)

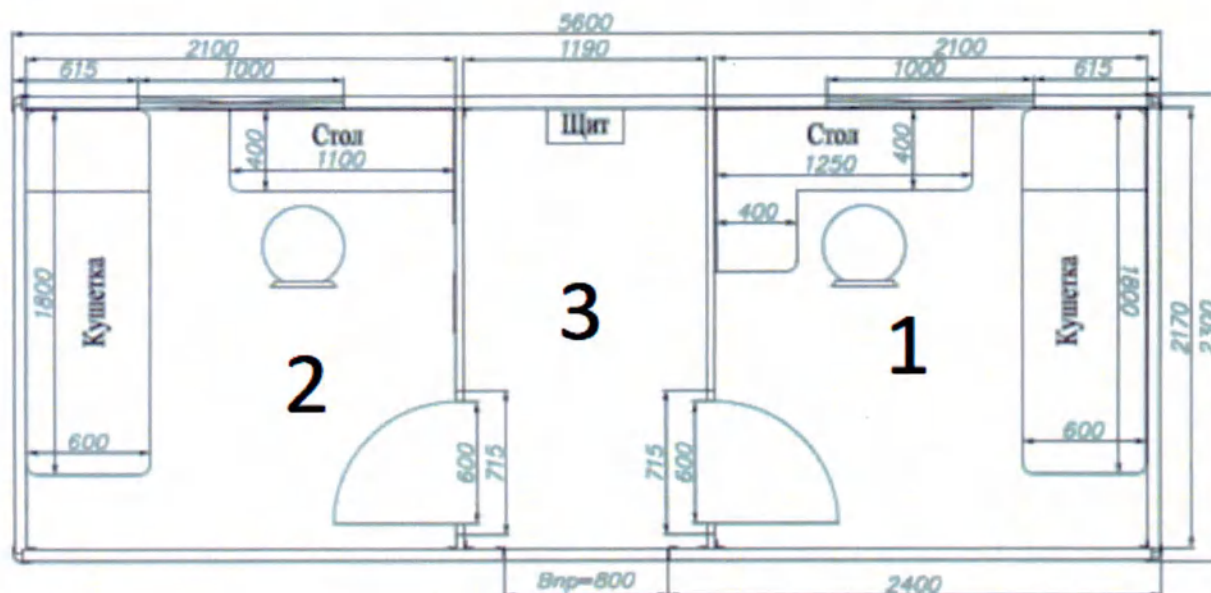


Рисунок 3-К

1. Кабинет (Вакцинация), (высота помещения =2000)
2. Кабинет (Передвижной пункт медицинского освидетельствования), (высота помещения =2000)
3. Коридор, (высота помещения =2000)
1. Кабинет (Вакцинация), (высота помещения =1950)

- кабинеты оборудованы медицинскими приборами и медицинской мебелью согласно Паспорту на Комплекс, входящим в комплект документации при поставке, расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе указано на схемах в Приложении 3.

- коридор оборудован вешалками для одежды.

- хозяйственный отсек служит для хранения хозяйственного инвентаря и для складирования медицинского оборудования при приведении его в транспортное положение (с возможностью размещения биотуалета), так же в отсеке может находиться вводной и распределительный электрощиты, МАП, имеет возможность расположение климатической установки.

- в генераторном отсеке находится электрогенератор для автономного жизнеобеспечения Комплекса.

- в отсеке для кондиционера располагается головной блок кондиционера.

**Внимание! Дверь отсека кондиционера остается открытой при включенной системе кондиционирования и системы вентиляции!**

Е) Питание оборудования производится от сети 220/380 В 50 Гц через вводной электрощит, подключаемый к внешней электросети 220/380 В с помощью кабеля (в комплекте).

Подключение медицинских приборов к сети осуществляется через розетки красного цвета. Подключение бытовых приборов к сети осуществляется через розетки белого цвета. (Рисунок 60).

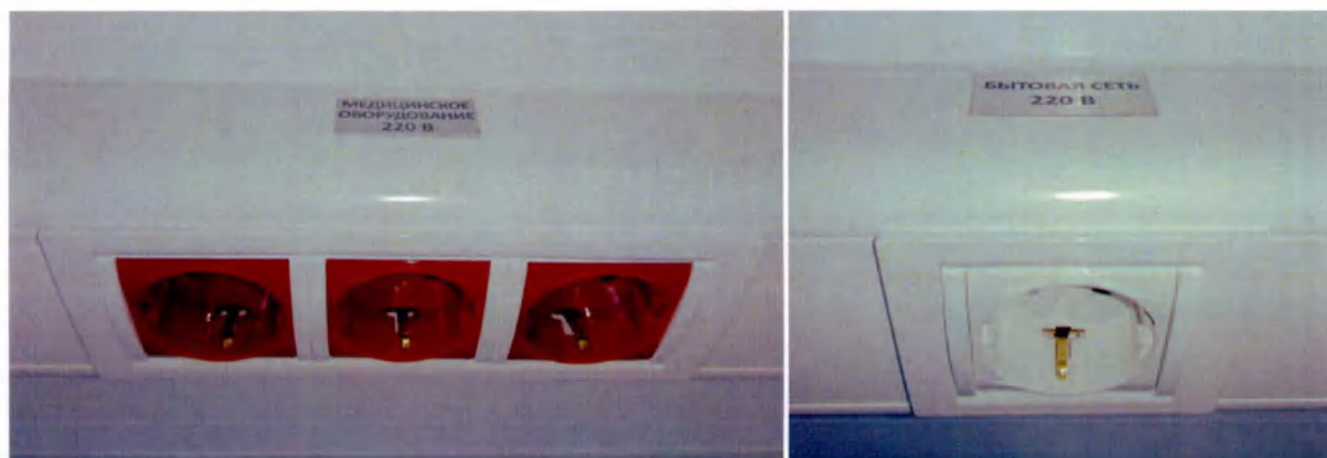


Рисунок 60. Электрические розетки.

Розетки комплекса имеют маркировку по ГОСТ Р МЭК 60601-1 с указанием следующей информации:

- номинального выходного напряжения в вольтах (220/380 В);

Бортовая сеть защищена от перегрузок устройствами защитного отключения, которые одновременно предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, предупреждения пожара при повреждении электроизоляции, для проведения тока в нормальном режиме и оперативным включении и отключении сети.

Подробно меры безопасности указаны в п.2.1.1 "Меры безопасности".

Ж) Для работы Комплекса могут быть использованы следующие источники питания:

- однофазная сеть переменного тока напряжением 220, либо трехфазная сеть 380 В, частотой 50 Гц;
- автономный генератор 220/380 В, частотой 50 Гц, мощностью от 2 до 20 кВт;
- аккумуляторные батареи с общим напряжением 12 или 24 В через преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC В мощностью не менее 2 кВт.

3) При невозможности подключения к внешней сети 220/380 В, в качестве источника питания Комплекса используется автономный электрогенератор 220/380 В, работающий на жидком топливе (Рисунок 4).

**ВНИМАНИЕ! Запрещается закрывать дверь генераторного отсека при работающем электрогенераторе. Отработавшие газы токсичны!**

**Запрещается запускать генератор при выключенном вентиляторе дополнительного охлаждения и закрытыми защитными жалюзи! (Рисунок 5, 5.1)**

**Запускать генератор в гараже или другом замкнутом помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Рисунок 4. Автономный электрогенератор.

Рисунок 5. Вентилятор доп.охлаждения



Рисунок 5.1. Жалюзи защитные вентилятора доп.охлаждения

В зависимости от источника питающего напряжения необходимо включить нужный пусковой переключатель на вводом электрощите (Рисунок 6).

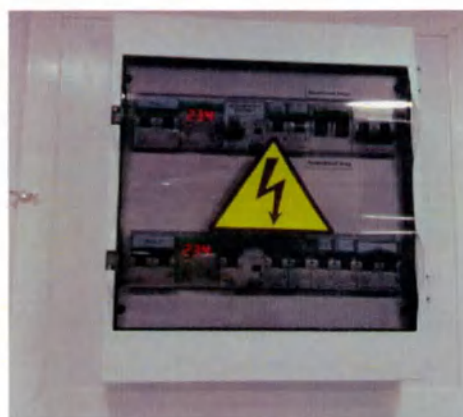


Рисунок 6. Вводной электрощит.



Рисунок 7. Вводный электрощит

Рисунок 7. Преобразователь напряжения 24/220 В

Электрощит имеет следующие символы и световые сигналы (ГОСТ Р МЭК 60601-1):

для левого переключателя:

- ГОРОД – при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от внешней электросети. При наличии напряжения загорится зеленый световой индикатор «Город»;

- ВЫКЛ, либо «О» – при установке переключателя в данное положение Комплекс будет обесточен от внешних источников (внешней электросети и электрогенератора);

- ГЕНЕРАТОР - при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от электрогенератора. При наличии напряжения загорится зеленый световой индикатор «Генератор»;

для правого переключателя:

- Основной ввод - при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от выбранного внешнего источника (источник выбирается левым переключателем) во внутреннюю сеть Комплекса. При наличии напряжения загорится зеленый световой индикатор «Основной ввод»;

- ВЫКЛ, либо «О» – при установке переключателя в данное положение внутренняя сеть Комплекса будет обесточена от всех источников;

- Аварийный ввод - при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от преобразователя напряжения 24(12)DC/220AC В (при выборе данного

источника питания левый переключатель необходимо установить в положение «Выкл.»). При наличии напряжения загорится красный световой индикатор «Аварийный ввод».

Электрощит имеет маркировку по ГОСТ Р МЭК 60601-1 знак «Осторожно! Высокое напряжение!» (Рисунок 6).

И) При невозможности подключения к внешней сети 220/380 В и запуска автономного электрогенератора в качестве источника питания Комплекса используется преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC В (Рисунок 7), работающий от основного или дополнительного аккумулятора. Преобразователь напряжения постоянно включен в питающую сеть Комплекса.

**ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение к преобразователю напряжения электрооборудования суммарной мощностью, превышающий его номинал.**

К) Температурный режим в отсеках Комплекса обеспечивается следующими видами оборудования:

- электрические нагреватели (конверторы), установленные в каждом рабочем отсеке (Рисунок 8);
- система кондиционирования, установленная в каждом рабочем кабинете (Рисунок 9);
- тепловая завеса, установленная над входной дверью в Комплекс (Рисунок 10, 10.1);
- вентиляционная фильтрующая установка с электрическим калорифером (Рисунок 11, 11.1);
- автономный воздушный отопитель, с возможностью работы во время движения (Рисунок 12, 12.1).

Л) Вентиляция в Комплексе осуществляется при помощи:

- естественной вентиляции через окна (Рисунок 13);
- принудительной приточной вентиляции, с помощью вентиляционной фильтрующей установки (Рисунок 11, 11.1);
- принудительной вытяжной вентиляции, с помощью канальных и бытовых вентиляторов (Рисунок 14, 14.1, 14.2).



Рисунок 8. Электрические нагреватели.



Рисунок 9. Система кондиционирования (внутренний блок).

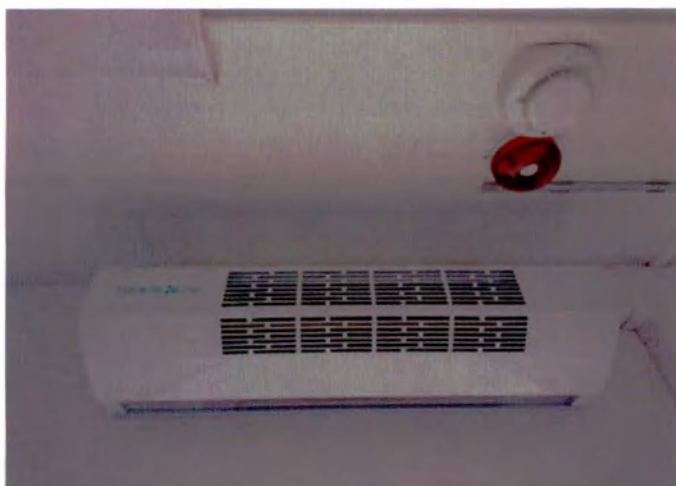


Рисунок 10. Тепловая завеса.



Рисунок 10.1. Пульт управления тепловой завесой.



Рисунок 11. Вентиляционная установка.



Рисунок 11.1. Пульт управления вентиляционной фильтрующей установкой.



Рисунок 12. Автономный воздушный отопитель.



Рисунок 12.1. Пульт управления автономным воздушным отопителем.



Рисунок 13. Окно.



Рисунок 14. Включатель принудительной вытяжной вентиляции.



Рисунок 14.1. Вентилятор канальный.



Рисунок 14.2. Вентилятор бытовой.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### 2.1.1 Требования безопасности

- К работе с Комплексом допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.
- На случай предотвращения возникновения пожара в салоне Комплекса установлена пожарная сигнализация. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный может находиться в кабине водителя (Рисунок 15) или в кузове фургона около вводно-распределяющего устройства (ВРУ). В каждом кабинете и отсеках Комплекса (кроме климатического) расположены извещатели пожарные дымовые (Рисунок 15.1). В кабине водителя и коридоре Комплекса расположены охранно-пожарные свето-звуковые оповещатели (Рисунок 15.1).



Рисунок 15. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный.


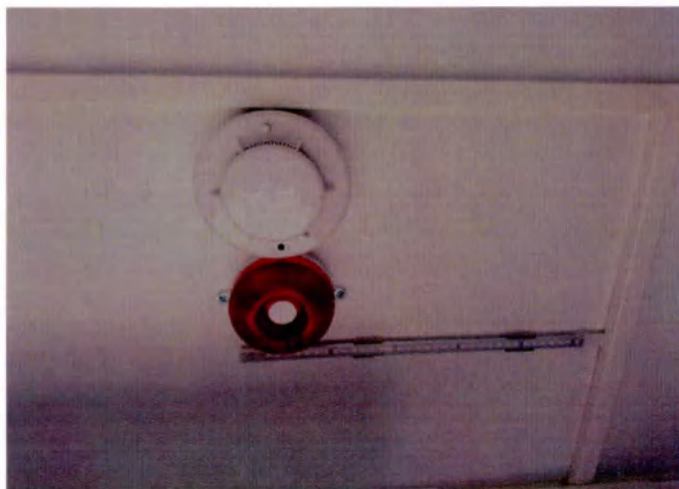


Рисунок 15.1. Извещатель пожарный дымовой и оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой.

Комплекс оснащается огнетушителями порошковыми (ОП-2(з)-АВСЕ-01). (Рисунки 16, 16.1).



Рисунок 16. Огнетушители (внутри Комплекса).

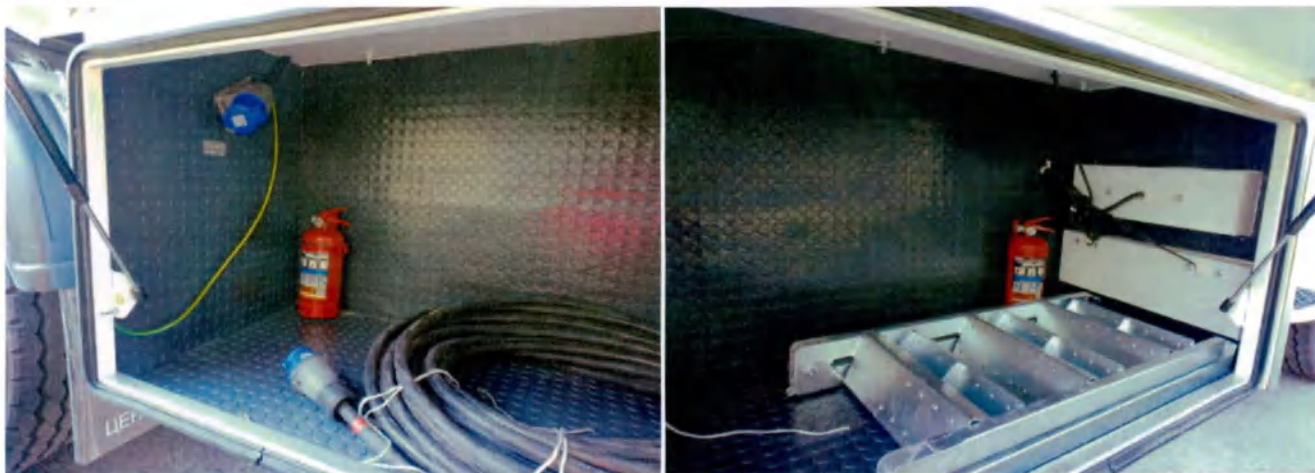

Рисунки 16.1. Огнетушители (в «подфургонном» боксе).

- Запрещается использование устройств с электромагнитным излучением в Комплексе, во избежание помех при работе медицинского оборудования.
- Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в помещении Комплекса.
- Запрещается использовать соединительные провода и кабель для подключения к внешней сети 220/380 В с поврежденной изоляцией.
- Запрещается при подключенном питании к внешней сети 220/380 В, при работающем автономном электрогенераторе 220/380 В, при включённом преобразователе напряжения 24/220 (380)В, 12/220 (380) В:
  - открывать силовой щит;
  - производить разборку вилок, розеток и прочего электрооборудования.
- Запрещается пользоваться измерительными приборами, работающими от сети 220/380 В, на открытом воздухе.
- Запрещается пользоваться трапом без перил и крайних опор.

**ВНИМАНИЕ!** Суммарная мощность нагрузки, подключаемая к розеткам Комплекса не должна превышать 10/18 кВт при работе от сети 220/380 В и электрогенератора. При работе от преобразователя напряжения 24(12)DC/220AC В суммарная мощность нагрузки не должна превышать его номинальную мощность.

Используйте соединительные провода и кабели, только идущие в комплекте с Комплексом. Производитель не несет ответственности за Комплекс, в случае использования не оригинальных частей.

## 2.1.2 Выбор места и стоянка Комплекса

### **Перед выездом проверьте техническое состояние Комплекса:**

1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли под Комплексом следов утечки масла или эксплуатационных жидкостей. По возможности устраните течь до выезда.

2. Обязательно проверьте давление воздуха в шинах и общее состояние шин. При необходимости доведите давление до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах 0,2–0,3 кгс/см<sup>2</sup> может ухудшить параметры управляемости, плавность хода транспортного средства и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива. По истечении одного месяца эксплуатации автомобиля необходимо:

а) Протянуть болты крепления надстройки к шасси с моментом затяжки 46...60 Н.м.

б) Ежемесячно проводить смазку петель и замков дверей.

в) Ежемесячно наносить силиконовую смазку на дверные уплотнители

3. Обойдите вокруг Комплекса, проверьте следующее:

– комплектность съемных деталей (щетki стеклоочистителя, наружные зеркала и др.);

– целостность стекол Комплекса, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснутые стекла Комплекса заменяйте при первой возможности;

– состояние замков и крепления трапов;

– наличие и состояние номерных знаков. Фары, подфарники, задние фонари и номерные знаки должны быть чистыми.

Перед дальней поездкой и после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса, укомплектуйте Комплекс инструментами и принадлежностями.

В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте Комплекса.

**Запрещается начинать движение Комплекса, не убедившись в надежности креплений медицинского оборудования, мебели, дверей и, по необходимости, других элементов Комплекса.**

### **Для приведения Комплекса в рабочее состояние:**

- Установить Комплекс на ровном участке дороги или на площадке с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием, без видимого уклона с сухой ровной поверхностью длиной не менее 12 метров, шириной не менее 6 метров.

- Стоянку Комплекса необходимо осуществить вблизи (до 20 метров) точки подключения внешней питающей цепи (разрешается пренебречь при запланированной работе автономного аварийного генератора).

- Установить противооткатные упоры под колеса Комплекса, расположенные в «подфургонном» боксе; за исключением транспортного средства 185514 (Рисунок 17), или на раме ТС (Рисунок 17.1).



Рисунок 17. Противооткатные упоры.



Рисунок 17.1. Противооткатные упоры.

Для транспортного средства 185514:

- затянуть стояночный тормоз автомобиля, при наличии установить противооткатные упоры под колеса Комплекса.

Для транспортного средства 185514, 385427, 385527:

- установить опоры кузова, расположены снизу в задней части Комплекса (Рисунок 18). Опоры устанавливаются путем кручения гайки специальным ключом, расположенным в генераторном отсеке, до опускания пятки опоры на землю (Рисунок 18.1).



Рисунки 18, 18.1. Установка опор кузова специальным ключом.

- Открыть заднюю дверь Комплекса и снять фиксирующие стяжки подножки-трапа. После этого плотно приставить подножку-трап к задней двери комплекса (Рисунок 19, 19.1).



Рисунки 19, 19.1. Установка подножки

### 2.1.3 Сборка трапа

Существует два варианта разновидности трапов, с прямым и боковым лестничным маршем:

**Вариант 1. С прямым лестничным маршем.**

- Открыть крышку технологического отсека входного трапа (ключ №1), расположенного под входной дверью в Комплекс (Рисунок 20, 20.1).

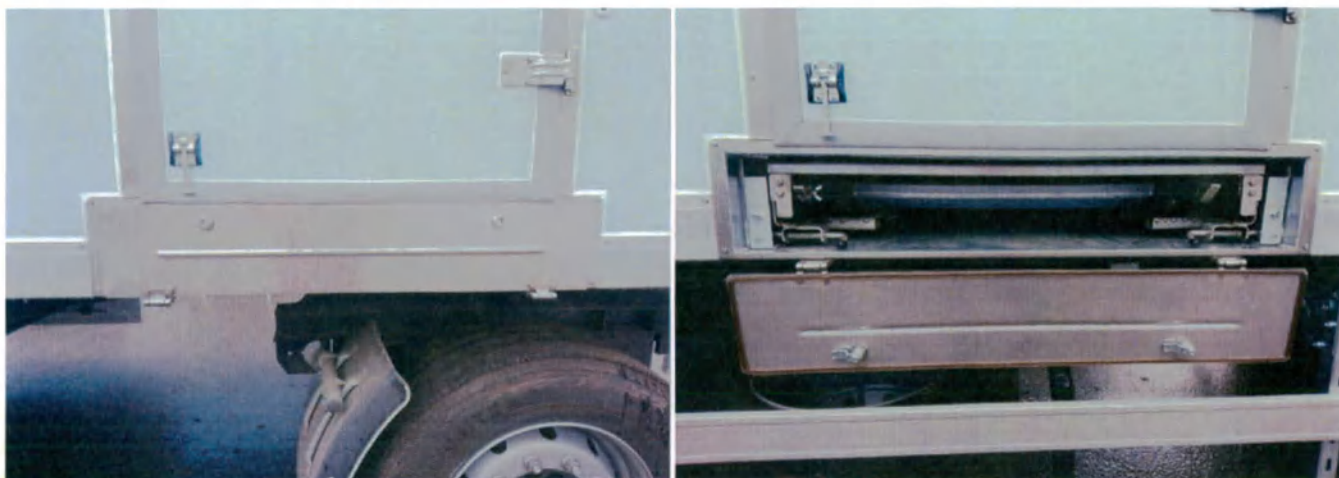


Рисунок 20, 20.1. Технологический отсек входного трапа. Вариант 1.

- Потянуть за ручки фиксаторов площадки, оставить их в открытом положении (Рисунок 21, 21.1).

- Выдвинуть площадку на себя до упора, включить дальние фиксаторы в положение закрыто, тем самым зафиксировав её (Рисунок 22, 22.1).



Рисунок 21, 21.1. Передние фиксаторы площадки входного трапа, в открытом положении.



Рисунок 22. Площадка входного трапа в выдвинутом положении.

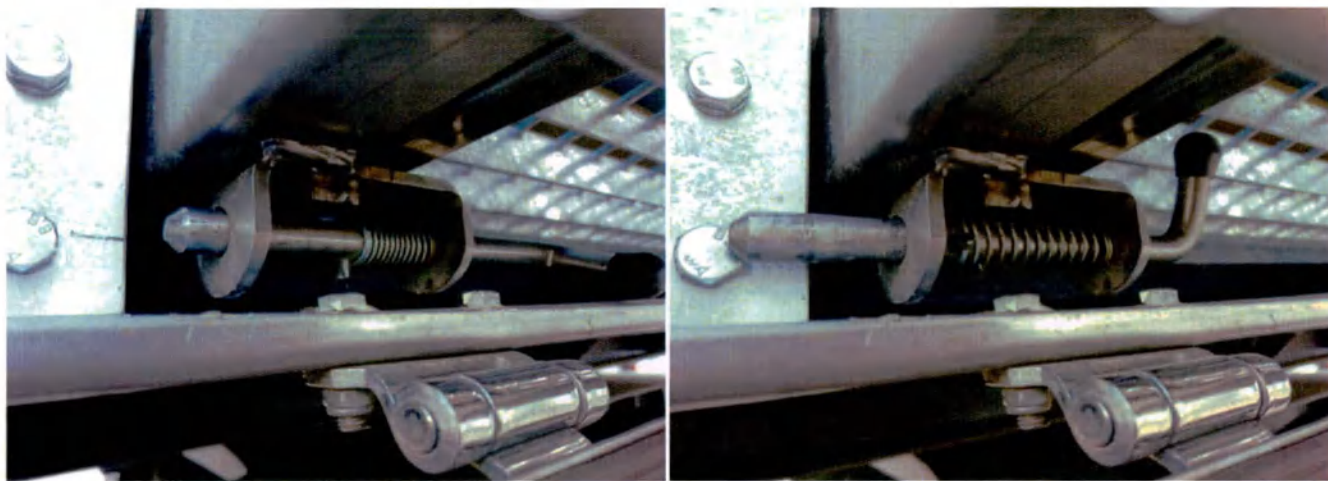


Рисунок 22.1. Задний левый фиксатор площадки входного трапа (открыто, закрыто).

- Вывернуть фиксирующий винт лестничного марша (Рисунок 23), выдвинуть марш на себя до упора, включить фиксаторы в положение закрыто (Рисунки 24, 25). При наличии, с помощью регулировочной пятки регулировать высоту лестницы.

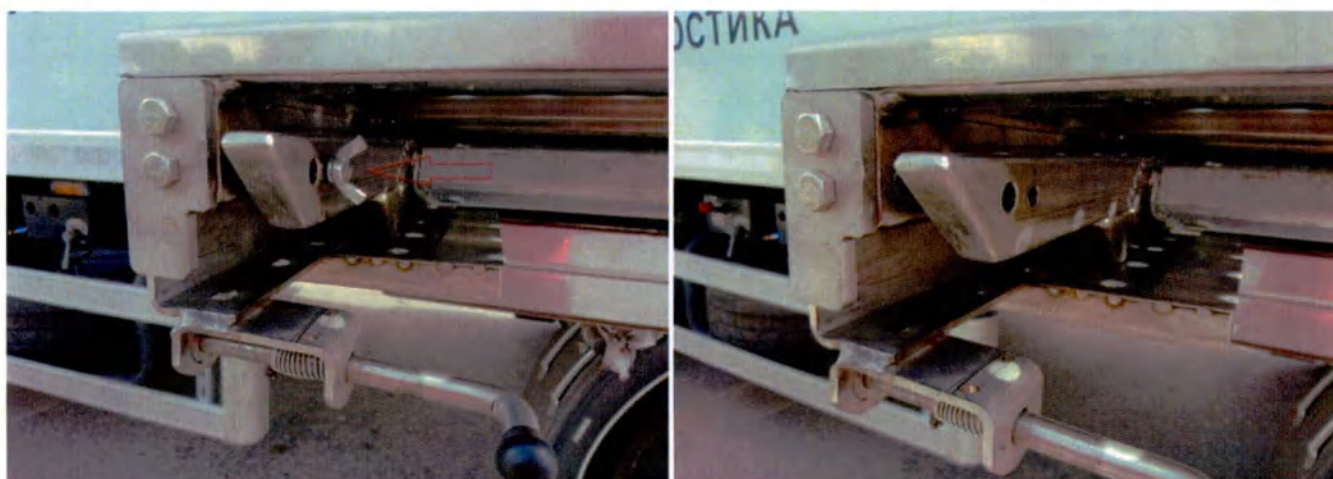


Рисунок 23. Фиксирующий винт лестничного марша.



Рисунок 24. Лестничный марш в выдвинутом положении.

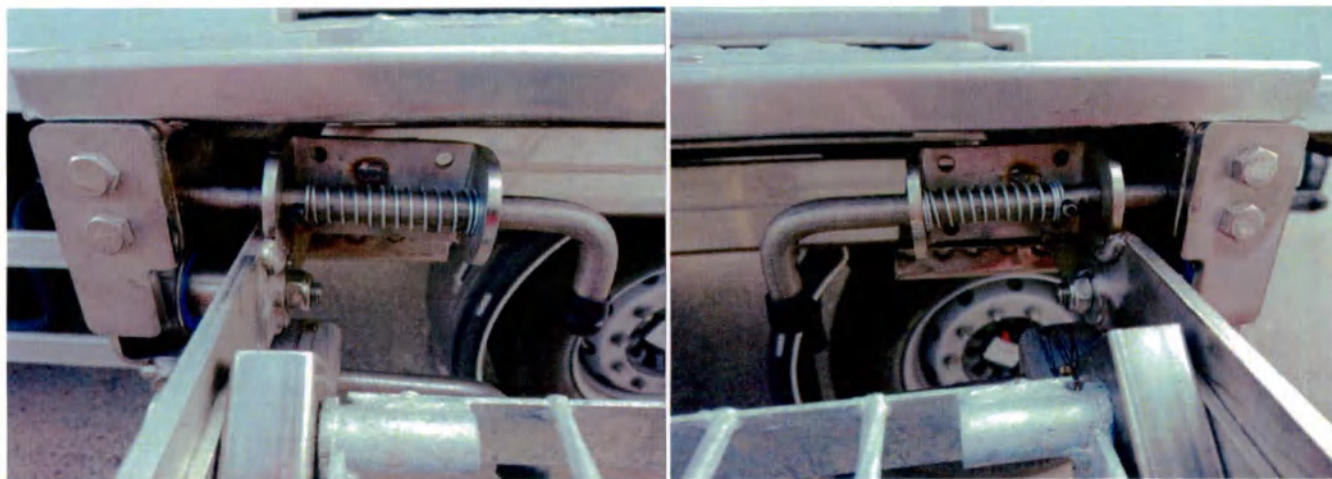


Рисунок 25. Фиксаторы лестничного марша в закрытом положении.

- Установить перила площадки, закрепить винтами и включить боковые фиксаторы (Рисунок 26, 26.1). Установить стойки перил лестничного марша, установить перила (Рисунок 27, 27.1).



Рисунок 26. Перила площадки.

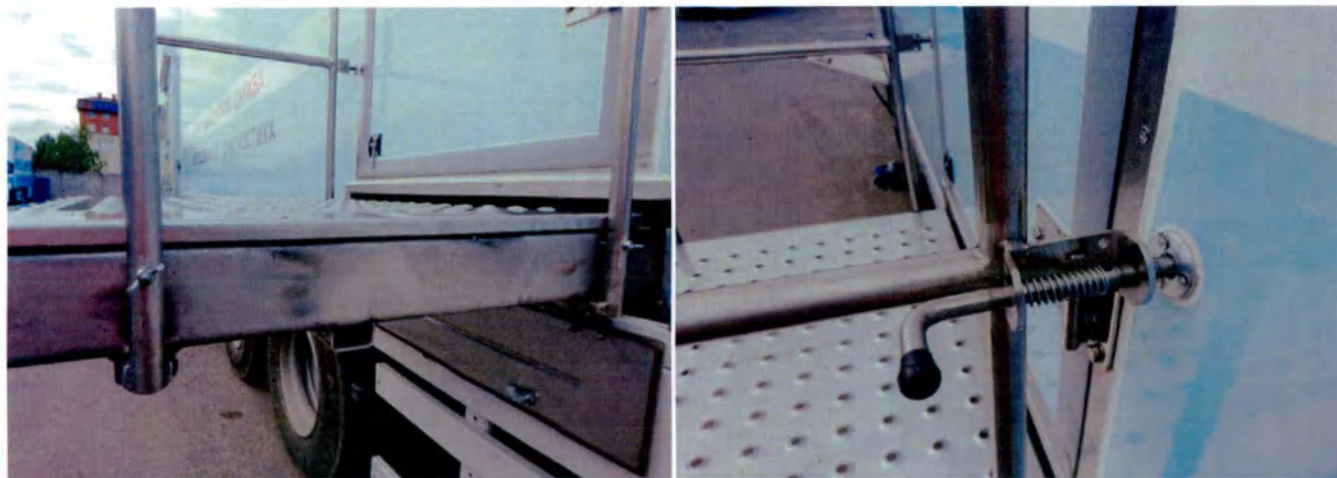


Рисунок 26.1. Винты и фиксаторы перил площадки.



Рисунок 27. Стойки перил лестничного марша.



Рисунок 27.1. Перила лестничного марша.

- Разборка трапа осуществляется в обратном порядке.
- Перила трапа хранятся в «подфургонных» боксах (Рисунок 28).



Рисунок 28. Варианты хранения перил.

#### Вариант 2. С боковым лестничным маршем.

- Открыть крышку технологического отсека входного трапа (ключ №1), расположенного под входной дверью в Комплекс (Рисунок 29).
- Потянуть за ручку фиксатора площадки, оставить его в открытом положении (Рисунок 30).
- Выдвинуть площадку на себя до упора, включить дальний фиксатор в положение закрыто (Рисунок 31, 32).
- Достать из заднего «подфургонного» бокса, лестничный марш, установить его к площадке, закрепить пружинными фиксаторами (Рисунок 33, 34, 34.1).
- Опустить опорные стойки площадки, закрепить их с помощью штифтов и пружинных фиксаторов, отрегулировать высоту (Рисунок 35, 36).



Рисунок 29. Тех.отсек входного трапа. Вариант 2.



Рисунок 30. Фиксатор трапа.



Рисунок 31. Площадка входного трапа.



Рисунок 32. Фиксатор площадки.



Рисунок 33. Задний «подфургонный» бокс.



Рисунок 34. Установленный лестничный марш.



Рисунок 34.1. Пружинные фиксаторы.



Рисунок 35. Опорные стойки площадки.



Рисунок 36. Фиксаторы опорных стоек.

- Установить стойки перил и закрепить пружинными фиксаторами (Рисунки 37- 40).



Рисунок 37. Стойки перил.



Рисунок 38. Стойки перил.



Рисунок 39. Пружинные фиксаторы стоек перил.



Рисунок 40. Пружинные фиксаторы стоек перил.

- Установить перила, закрепить их к стойкам с помощью штифтов и пружинных фиксаторов (Рисунки 41, 42).



Рисунки 41. Входной трап. Вариант 2.



Рисунки 42. Штифты и фиксаторы перил.

- Зафиксировать перила между собой при помощи болта с гайкой (Рисунок 43).



Рисунки 43. Фиксация перил между собой.

- Разборка трапа осуществляется в обратном порядке.

Все крепежные и фиксирующие элементы на трапе должны быть затянуты.

Особое внимание необходимо уделить местам крепления трапа к Комплексу и контролировать качество соединения в процессе использования.

#### **2.1.3.1 Защитный тент (козырёк).**

Опционально может устанавливаться защитный тент (козырёк)

- Для защиты от осадков и прямых солнечных лучей, при необходимости разворачивается защитный тент (Рисунок 44).



Рисунок 44. Защитный тент (козырёк).

**Использовать тент только во время стоянки Комплекса. Запрещается оставлять тент раскрытым без присмотра или на ночь. При сильном ветре (более 30 км/ч) и во время сильного дождя рекомендуется немедленно складывать тент. Эксплуатация тента в зимних условиях при сильном снегопаде может привести к его повреждению. При закрытии и раскрытии тента не трогайте подвижные части. Не допускайте дополнительной нагрузки на рычаги тента. В системах с ручным приводом при закрытии нельзя применять силу.**

Складывайте тент по возможности в сухом и чистом состоянии (без листвы и прочего мусора). Мокрые и грязные тенты стоит при первой же возможности раскрыть для просушки. Пренебрежение этой мерой может привести к складкам ткани и другим видимым повреждениям покрытия, не предусмотренным гарантией. Ткань тента при незначительном загрязнении моется слабым мыльным раствором мягкой щеткой, и тщательно промывается чистой водой.

- С помощью рукоятки (Рисунок 45) разверните защитный тент. Вставьте рукоятку в приёмную муфту передающего кардана (Рисунок 46).

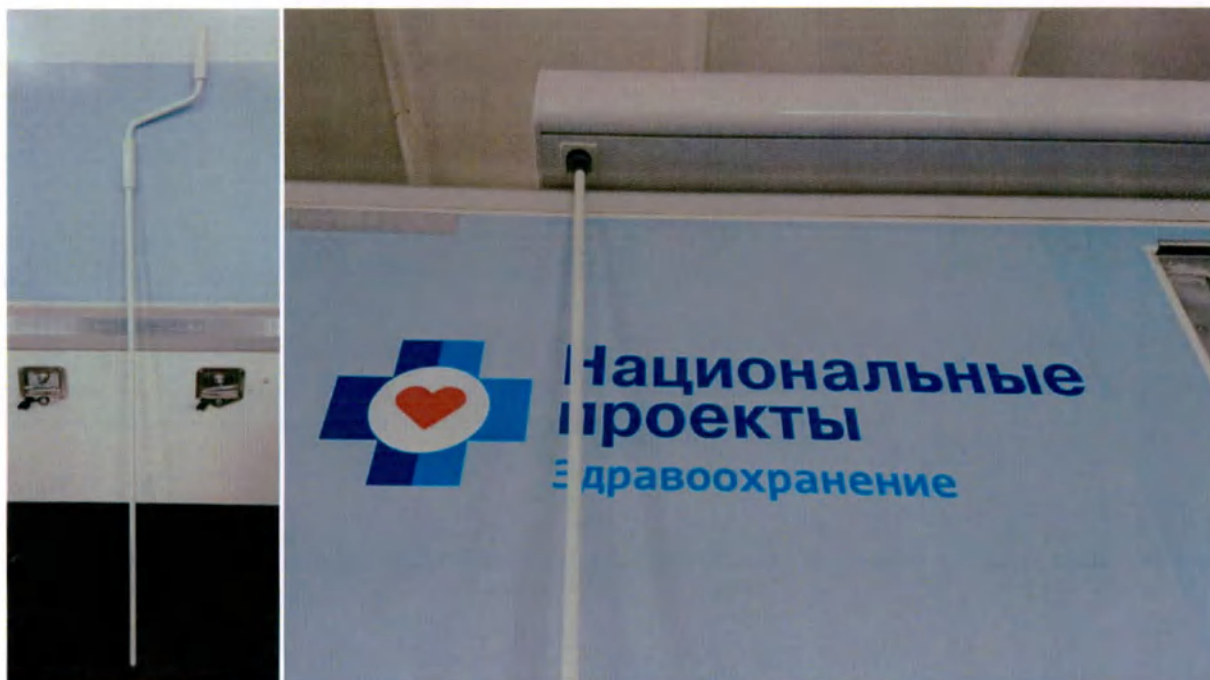


Рисунок 45. Рукоятка защитного тента.

Открытие тента осуществляется с помощью вращения рукоятки почасовой стрелки (рисунок 47, 47.1). Или с помощью пульта дистанционного управления, при наличии электропривода.

- Закрытие тента осуществляется в обратном порядке.



Рисунок 46. Приёмная муфта передающего кардана

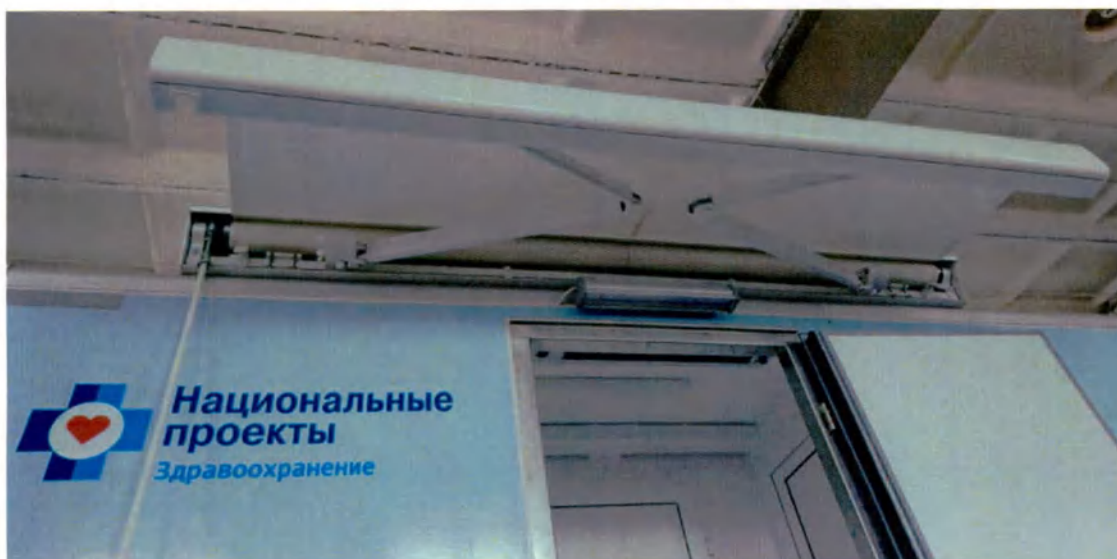


Рисунок 47. Открытие тента.



Рисунок 47.1. Открытый тент.

#### 2.1.4 Подключение к электропитанию

##### А) Подключение к внешней электросети

Для подключения к внешней электросети, Комплекс оснащен силовым кабелем с заземлением марки КГнг длиной не менее 15м с промышленными разъемами на концах. При транспортировке кабель в сложенном виде находится в «подфургонном» боксе (Рисунок 48).

**Осторожно! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление!**



Рисунок 48. Кабель силовой с заземлением.

- Подключить кабель питания к разъёму «ВВОД «ГОРОД»». Разъём расположен в «подфургонном» боксе или на борту Комплекса (Рисунок 49).

- один конец Т-образного штыря заземления установить в земле, другой соединить с ПМК посредством кабеля.



Рисунок 49. Вилка «ВВОД 220В».

- Подключить другой конец кабеля питания к предварительно обесточенному источнику внешнего питания.

**ВНИМАНИЕ! К источнику внешнего электропитания кабель следует подключать через автоматический выключатель или плавкие вставки (предохранители). Автоматический выключатель должен содержать тепловой или электромагнитный расцепитель (механическое коммутационное устройство).**

- Проверить правильность и надежность подключения кабеля.  
 - Включить напряжение на кабель со стороны внешнего источника питания.  
 - Повернуть левый переключатель в положение «ГОРОД» на силовом электрошите, расположенном в хозяйственном отсеке. При правильном подключении должен загореться

индикатор зеленого цвета (Рисунок 50).

- Правый переключатель повернуть в положение «Основной ввод». При правильном подключении должен загореться индикатор зеленого цвета (Рисунок 50).



Рисунок 50. Пусковые переключатели и сигнальные лампы.

Выключение питания от внешней сети производится путем поворота сначала правого выключателя в среднее положение («О»), далее левый выключатель в среднее положение («О»). Индикаторные лампы должны потухнуть. Далее в обратном порядке подключения.

Б) Подключение к автономному электрогенератору.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается закрывать дверь генераторного отсека при работающем электрогенераторе. Отработавшие газы токсичны!**

**Запрещается запускать генератор при выключенном вентиляторе дополнительного охлаждения и закрытыми защитными жалюзи! (Рисунок 5, 5.1)**

**Запускать генератор в гараже или другом замкнутом помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Для подключения Комплекса к автономному электрогенератору необходимо:

- Открыть дверь генераторного отсека, расположенного с внешней стороны Комплекса.
- Установить технический трап (Рисунок 51), расположенный в «подфургонном» боксе (для удобства обслуживания генераторного отсека).
- Подключить вилку питания к выходной розетке электрогенератора (Рисунок 52).
- Завести электрогенератор (см. руководство по эксплуатации генератора, входящий в комплект документации при поставке). Включить дополнительный вентилятор охлаждения, который располагается с боку или под электрогенератором (Рисунок 5).



Рисунок 51. Технический трап.



Рисунок 52. Вилка питания от генератора.

- Повернуть левый переключатель в положение «Генератор» на силовом электрощите. При правильном подключении должен загореться индикатор зеленого цвета.

- Правый переключатель повернуть в положение «Основной ввод». При правильном подключении должен загореться индикатор зеленого цвета.

Выключение питания от генератора производится путем поворота сначала правого переключателя в среднее положение, далее левый переключатель в среднее положение. Индикаторные лампы должны потухнуть. Далее в обратном порядке подключения.

В) При невозможности подключения к внешней сети 220/380 В и запуска автономного генератора в качестве источника питания Комплекса используется преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC (Рисунок 53), работающий от аккумуляторов шасси или дополнительных АКБ.

Для правильного включения преобразователя необходимо выполнить в строгом порядке следующие действия:

- Убедиться включен ли в электрощите красный рубильник автомат 12/24V.
- Включить клавишу 12/24В, находящуюся справа сзади преобразователя.
- Включить автомат 220В, находящийся слева сзади преобразователя.
- Преобразователь включится, через несколько секунд включатся 3 индикатора.
- В электрощите установить автомат «ОТ МАП» в верхнее положение ВКЛ и реле в положение «Аварийный ввод».

При правильном включении преобразователь не должен издавать звуковые сигналы, за исключением нескольких в первые несколько секунд. (Для дополнительной информации

необходимо руководствоваться инструкцией на преобразователь, находящейся в комплекте документации.)



Рисунок 53. Преобразователь напряжения 24/220В (МАП).

- На электрошите повернуть левый переключатель в среднее положение, правый переключатель в положение «Аварийная сеть».

- На электрошите должна гореть только лампа красного цвета.

Г) Подключение через преобразователь напряжения 12/220В к бортовой сети.

Для подключения Комплекса через преобразователь напряжения 12/220В необходимо:

- В электрошите установить автомат «ОТ МАП» в верхнее положение ВКЛ и реле в положение «Аварийный ввод».

- В случае если преобразователь напряжения выключен, необходимо его включить.

- При включении загорится индикация на экране преобразователя и раздастся звуковой сигнал.

- При правильном подключении индикатор реле контроля входного напряжения не загорается.

- Для работы сети необходимо в электрошите включить соответствующие автоматы в верхнее положение ВКЛ. От преобразователя питание подается только на медицинские розетки красного цвета, вентиляцию, освещение и автономный воздушный отопитель.

- Проверить работоспособность сети можно путем включения основного освещения и/или облучателя-рециркулятора.

При питании от генератора или внешней сети, включенный преобразователь заряжает аккумуляторы шасси.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается подключение к преобразователю напряжения электрооборудования суммарной мощностью превышающей его номинальную мощность.

Выключение питания от преобразователя производится путем поворота сначала правого переключателя в среднее положение, левый переключателя остается в среднем положении. Индикаторные лампы должны потухнуть. Далее в обратном порядке подключения.

### 2.1.5 Освещение

В Комплексе установлено искусственное освещение двух видов: общее и вспомогательное (аварийное) (Рисунок 54, 55).

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается закрывать дверь генераторного отсека при работающем электрогенераторе. Отработавшие газы токсичны!

Запрещается запускать генератор при выключенном вентиляторе дополнительного охлаждения и закрытыми защитными жалюзи! (Рисунок 5, 5.1)

Запускать генератор в гараже или другом замкнутом помещении **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Рисунок 54. Искусственное освещение.



Рисунок 55. Аварийное освещение.

Общее освещение обеспечивается светильниками, установленными на потолке в каждом отсеке. Общее освещение работает от сети 220 В.

Общее освещение включается в каждом отсеке выключателем, находящимся рядом с дверным проемом (Рисунок 56).



Рисунок 56. Выключатели общего и вспомогательного (аварийного) освещения.

Вспомогательное освещение - обеспечивается светильниками меньшей мощности, установленными в каждом отсеке. Вспомогательное освещение работает от бортовой сети транспортного средства.

Вспомогательное (аварийное) освещение включается выключателем в коридоре Комплекса.

### 2.1.6 Система внутреннего отопления – охлаждения помещений

Система Комплекса состоит из:

- электрических нагревателей (конверторы) (Рисунок 8), установленных в каждом рабочем отсеке;

- системы кондиционирования (сплит-система): наружный блок, расположенный в отдельном климатическом отсеке Комплекса или вне Комплекса, внутренние блоки, расположенные в каждом рабочем кабинете с индивидуальным пультом управления (Рисунок 57).

Система работает на обогрев и охлаждение помещений при температуре окружающей среды не ниже минус 5°C.



Рисунок 57. Внутренний и наружный блоки кондиционера.

- тепловой завесы, установлена в коридоре над входной дверью Комплекса, для создания теплового барьера во время работы Комплекса в зимнее время года (Рисунок 58);



Рисунок 58. Тепловая завеса и пульт управления.

- автономный воздушный отопитель, с возможностью работы во время движения от топливного бака автомобиля или собственного бака (Рисунок 59).



Рисунок 59. Автономный воздушный отопитель и пульт управления.

(смотри инструкцию эксплуатации, входящую в комплект документации при поставке).

**Внимание! Требуется периодическая промывка фильтров внутренних блоков под струей воды! (см. раздел регламентные работы).**

**Внимание: запрещается использование одновременно всех систем отопления - охлаждения!**

**Допускается использование одновременно - воздушной завесы и батарей (конвекторов) и автономного воздушного отопителя, либо только системы кондиционирования!**

#### **Автономный воздушный отопитель.**

Комплекс оснащен автономным воздушным отопителем, который позволяет быстро обогреть Комплекс как во время движения, так и во время стоянки.

Для включения автономного воздушного отопителя необходимо включить отопитель (смотри инструкцию по эксплуатации воздушного отопителя, входящую в комплект документации при поставке), поворотным или кнопочным выключателем (Рисунок 59).

#### **Запрещается:**

**- Выключать напряжение питания воздушного отопителя, пока не завершится цикл отключения устройства;**

**- Ставить на поверхность блока воздушного отопителя какие-либо предметы;**

**- Загораживать воздухозаборное отверстие воздушного отопителя;**

**- Загораживать отверстие подачи воздуха в коридоре;**

**- Пользоваться воздушным отопителем при появлении запахов продуктов горения дизельного топлива внутри Комплекса.**

#### **Система кондиционирования.**

Каждый кабинет Комплекса оснащен внутренним блоком кондиционера.

Включение системы кондиционирования:

- Открыть люк климатического отсека, расположенного над генераторным отсеком (Рисунок 57);
- Включить индивидуальные блоки в кабинетах (смотри инструкцию по эксплуатации кондиционера, входящую в комплект документации при поставке).

**Запрещается: Использовать кондиционер с закрытым люком климатического отсека.**

#### Система водоснабжения.

Система водоснабжения (Рисунок 60) представляет собой канистру под чистую воду объемом 10 л, канистру под использованную воду объемом 15 л, насоса подачи и подогрева воды (располагается в канистре с чистой водой).

**ВНИМАНИЕ! Подогреватель воды перед включением должен быть погружен в воду!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать подогреватель воды при отсутствии воды!**



Рисунки 60. Система водоснабжения.

Для использования системы водоснабжения необходимо в канистру для чистой воды налить воду, опустить в нее насос-нагреватель, сливной шланг мойки установить в канистру под использованную воду. Включить питание насоса-нагревателя путем установки вилки белого цвета в бытовую розетку. Для подачи воды необходимо повернуть кран. Регулировка температуры нагрева происходит с помощью вращения выключателя-регулятора на насосе-нагревателе (смотри инструкцию по эксплуатации насоса-нагревателя, входящую в комплект

документации при поставке).

**ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева нагревателя и насоса не допускается использовать систему водоснабжения без воды, требуется периодически осматривать канистру на наличие воды!**

### 2.1.7 Медицинское и другое оборудование Комплекса.

Для электрического подключения оборудования в Комплексе предусмотрено два вида электрических розеток, красного цвета для медицинского оборудования и белого цвета для бытовых нужд (Рисунок 60).

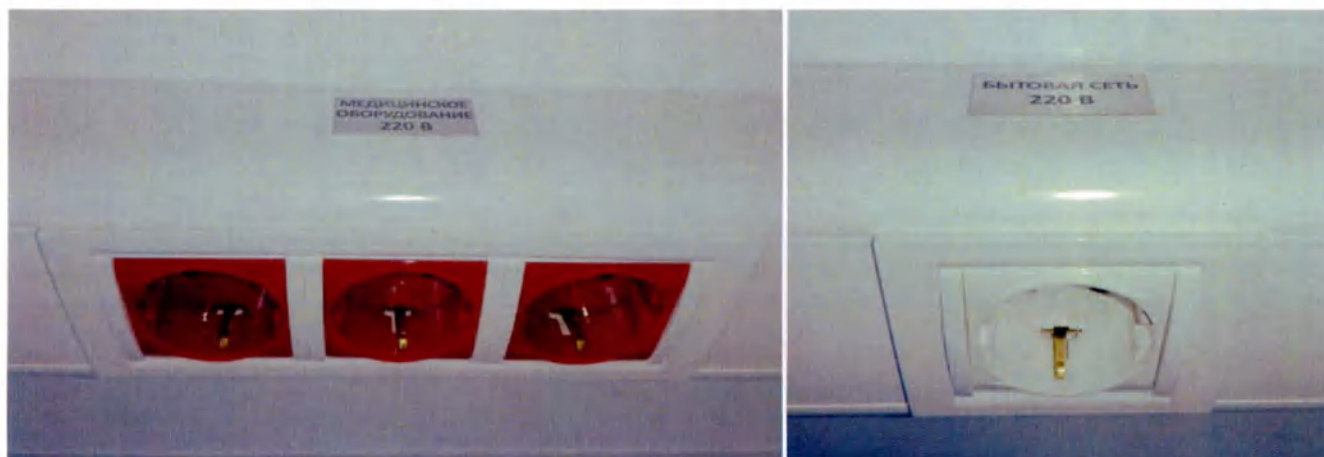


Рисунок 60. Электрические розетки.

#### 2.1.7.1 Транспортное и рабочее положение оборудования и мебели.

Оборудование и мебель при движении перевозится в транспортном положении. Перед началом медицинского приема, Комплекс необходимо перевести в рабочее положение, освободив мебель и оборудование от креплений, транспортных упаковочных сумок и ящиков, убрав транспортировочную тару в служебное помещение. Расставить медицинское оборудование и мебель в соответствии с рабочими кабинетами и рабочими местами приема медицинского персонала.

#### 2.1.7.2 Крепление мебели при транспортном положении:

- стулья крепятся к стене при помощи транспортных кронштейнов (Рисунок 61);




Рисунки 61. Крепление мебели.

- при приведении Комплекса в рабочее положение, выкрутить крепление (в стене останется только ответная часть (Рисунок 62)), уложить кронштейны в ящик для временного хранения в хозяйственный отсек.



Рисунок 62. Транспортные кронштейны.

- двери Комплекса в транспортном состоянии фиксируются в закрытом положении и закрываются на замок с помощью ключей. В рабочем состоянии могут быть открыты и удерживаться дверными фиксаторами (Рисунок 63).

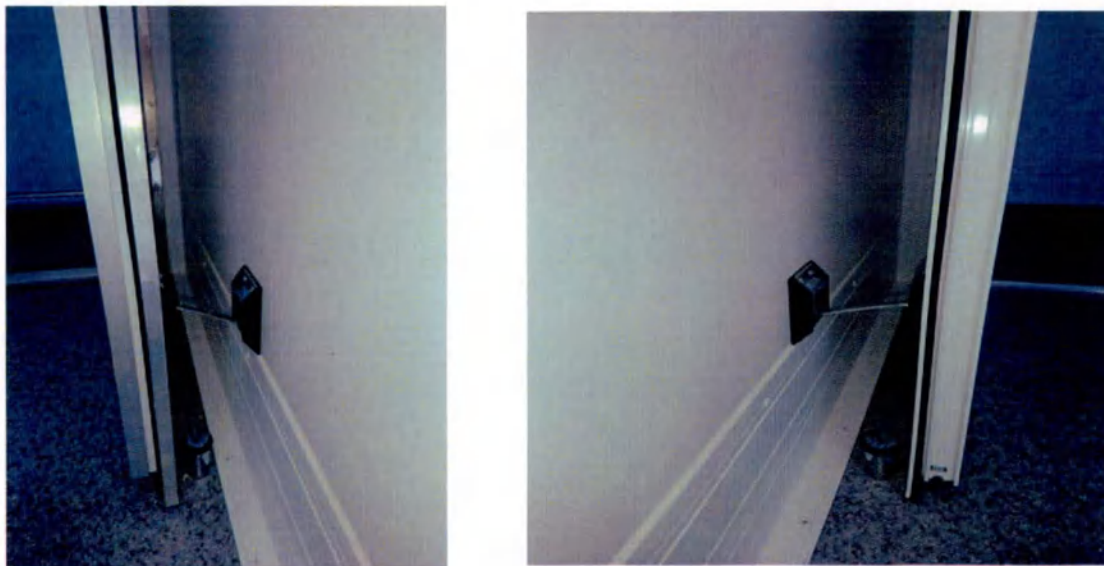

Рисунки 63. Дверные фиксаторы.

- сдвижные двери Комплекса в транспортном состоянии фиксируются в закрытом положении, закрываются на замок, закрывается нижний шпингалет и фиксируются двумя резьбовыми фиксаторами (Рисунок 64).

-при наличии, зафиксировать дверь с помощью винта-барашка.



Рисунок 64. Фиксация сдвижных дверей в транспортном положении.

**2.1.7.3 Пример транспортного расположения и крепления медицинского оборудования:**

- Гинекологическое кресло неподвижно закреплено к полу. Дополнительно кресло имеет транспортный крепежный элемент **красного цвета**, расположенный под подъемным механизмом кресла, для приведения кресла в рабочее состояние необходимо отвернуть два винта-барашка транспортного крепежного элемента (Рисунок 65).



Рисунок 65. Гинекологическое кресло и транспортный кронштейн.

**Внимание! Во избежание поломки подъемного механизма гинекологического кресла не допускается транспортировка без фиксации транспортного кронштейна.**

- УЗИ аппарат ставится на полу в специальном кейсе и крепится специальными резиновыми стяжками к внешней стене Комплекса. Тележка для УЗИ крепится стяжками к полу (Рисунок 66, 66.1).



Рисунок 66, 66.1. Крепление кейса с аппаратом УЗИ и тележки.

- настенное крепление (кронштейн) для кольпоскопа крепится стяжками к стене (Рисунок 67).



Рисунок 67. Крепление кронштейна для кольпоскопа.

- В смотровой кушетке предусмотрены места для транспортировки: спирометра, электрокардиографа, весов напольных, газоанализатора, комплекта ручного ИВЛ, наборов врачей ОП, укладки врача скорой помощи, набора пробных очковых линз с оправой и других приборов (Рисунок 68).



Рисунок 68. Смотровая кушетка, места хранения.

- В навесных полках предусмотрены места для транспортировки: индикатора ВГД, отоскопа, офтальмоскопа, перкуссионного молоточка, камертона, стетоскопа, аппарата для измерения АД, анализатора мочи, глюкометра, емкости для дезинфекции, штативов для пробирок, расходного материала для гематологического анализатора и других приборов (Рисунок 68).



Рисунок 68. Расположение медицинского оборудования в навесных полках.

- Ростомер закреплен неподвижно к стене Комплекса и не требует специального транспортного положения (Рисунок 69).



Рисунок 69. Крепление ростомера.

- Гематологический анализатор имеет стационарное крепление к столешнице и транспортируется в этом же положении, дополнительно накрывается мягким чехлом (Рисунок 71).



Рисунок 71. Гематологический анализатор.



Рисунок 72. Расположение оборудования, на полках в хозяйственном отсеке.

- На полках в хозяйственном отсеке предусмотрены места для транспортировки: Автоматизированных рабочих мест медицинского персонала (компьютеров) в специальных сумках, датчиков для УЗИ аппарата, хозяйственного инвентаря, технологической документации, паспорта, инструкции по эксплуатации и др. (Рисунок 72).

## **2.2 ПОДГОТОВКА И ПРИВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

### **2.2.1 Подготовка**

После проведения медицинского приёма, внутренние и наружные поверхности, установленные в салоне мебель и оборудование, следует протирать чистой ветошью, дополнительно руководствуясь инструкциями на установленное оборудование. Обязательно провести полную дезобработку поверхностей, в соответствии с нормативами для кабинетов медицинского приема. Дезинфекцию воздуха в кабинетах осуществлять периодическим включением бактерицидных облучателей – рециркуляторов, согласно руководству по эксплуатации на облучатели – рециркуляторы, входящий в комплект документации при поставке.

### **2.2.2 Приведение Комплекса в транспортное положение:**

- обесточить медицинское оборудование и привести его в транспортное положение;
- слить воду из электроводонагревателей;
- слить воду из емкостей слива использованной воды (Рисунок 60) и произвести ее дезинфекцию 1% раствором хлорамина по ГОСТ Г-01-76-79;
- произвести отключение всех электроприборов на щите управления;
- отключить источник внешнего электропитания;
- отсоединить конец кабеля от обесточенного источника внешнего электропитания;
- произвести отключение другого конца кабеля от разъема «ВВОД ГОРОД» на Комплексе;
- очистить кабель (с проводом заземления) от пыли и грязи, свернуть и уложить в транспортировочный ящик;
- собрать трап и уложить в отведенный для него ящик;
- зафиксировать двери с помощью винта-барашка.

## **3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при общем пробеге за этот период не более 60000 км.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка на базовое транспортное средство, двигатель, шины, аккумуляторные батареи и лампы даются предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными на них стандартами и ТУ.

Средний срок службы Комплексов должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления Комплекса путем ремонта. Оценка состояния Комплекса проводится комиссией на основании дефектной ведомости и акта.

Использование Комплекса не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний руководства по эксплуатации и внесение каких-либо конструкторских изменений без согласования с разработчиком конструкторской документации, не разрешаются.

В случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензии не рассматривает.

**Владелец Комплекса лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:**

1. Нарушение указаний и требований, изложенных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.
2. Несоблюдение указанных в эксплуатационной документации на медицинские изделия, специальное оборудование и транспортное средство, плановых технических обслуживаний, если это предусмотрено производителем.
3. Повреждение Комплекса в результате дорожно-транспортного происшествия.
4. Замена стандартных медицинского оборудования и агрегатов Комплекса на не предусмотренные конструкцией.
5. Установка дополнительного оборудования, без согласования с заводом-изготовителем.
6. Вынос закрепленного оборудования (при долговременном хранении допускается вынос медицинского оборудования, в состав которого входит оптика и компьютерная техника, обязательно составление описи медицинского оборудования, извлекаемого из Комплекса, один экземпляр которой должен храниться внутри Комплекса).
7. Использование Комплекса не по назначению.

#### **4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Работоспособность и исправность Комплекса, в том числе находящихся в нем инженерных систем, оборудования, мебели, на протяжении их срока службы (за исключением гарантийного периода) должны обеспечивать эксплуатирующие организации путем проведения технического обслуживания (с периодическим контролем) и ремонта, которые включают в себя ежесменное обслуживание (ЕО), техническое обслуживание (ТО), периодиче-

ское и сезонное обслуживание (СО) и текущий ремонт (ТР).

ЕО проводится ежедневно и включает в себя осмотр Комплекса и выявление возможных неисправностей - проверку действия приборов освещения, отопления и вентиляции, плотности притвора дверей, наличия противопожарных средств, уборку и дезинфекцию помещений.

ТО проводится не реже одного раза в месяц и включает в себя выполнение всех работ ежесменного обслуживания, а также проверку состояния самого Комплекса, его заземления, а также работу всего электрооборудования и освещения путем пробных включений с устранением замеченных неисправностей, инструктажа медицинского персонала.

Первое ТО проводится по истечении 1 месяца первого года эксплуатации, со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию. И предусматривает все регламентные работы, а так же контроль за выполнением настоящей инструкции к эксплуатации бригады специалистов, работающих в передвижном Комплексе. В гарантийном талоне делается отметка о соответствующем прохождении 1-го регламентного ТО.

СО проводится не реже одного раза в три - шесть месяцев или после перемещения Комплекса на новое место и включает в себя выполнение всех работ, входящих в ЕО и ТО, а также осмотр и чистку от пыли щита питания, проверку заземления всех электропотребителей, проверку крепления электрооборудования и проводов, проверку состояния наружной и внутренней обшивок, подкраску поверхностей с наружным лакокрасочным покрытием, проверку состояния и работоспособности окон и дверей, замков и защелок, состояние огнетушителей, проверку работы инженерных систем и устранение замеченных неисправностей.

ТР должен проводиться один раз в год (при необходимости) и включать в себя частичное восстановление или замену наружной и внутренней обшивок, полов, теплоизоляции, конструкций дверей и окон, мебели, инженерных систем, подкраску внутренних и наружных поверхностей, проверку сопротивления изоляции электропроводки Комплекса.

Техническое обслуживание, поверка и ремонт оборудования и приборов, установленных в Комплексе, должны производиться в соответствии с указаниями прилагаемых на них документов и регламентов.

Не допускается использование Комплекса, не прошедшего плановые ТО, а также при наличии в конструкциях, инженерных системах, оборудовании и мебели дефектов, которые могут оказать влияние на безопасность находящихся в них людей.

Обслуживание и ремонт шасси Комплекса в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания с обязательной отметкой о

проведении работ в талонах сервисной книжки, входящей в комплект документации при поставке.

## 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА.

Регулярно проверяйте:

- надежность креплений мебели и оборудования, при ослаблении необходимо подтянуть болты, винты;
- давление воздуха в шинах;
- состояние резиновых стяжек. Поврежденные резиновые стяжки необходимо заменить;
- чистоту клемм и зажимов аккумуляторных батарей и за надежностью их соединения (шасси транспортного средства и электрогенератора);
- уровни и состояние горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей.

**Выхлопные газы ядовиты! Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя и электрогенератора, должно хорошо вентилироваться.**

Используйте горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные заводами-изготовителями изделий.

**Дизельное топливо (или бензин), а так же его пары ядовиты и огнеопасны! Соблюдайте меры предосторожности и правила пожарной безопасности! Избегайте попадания бензина на кожу и одежду, а паров бензина – в дыхательные пути. При заправке транспортного средства и электрогенератора избегайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие.**

Соблюдайте скоростной режим. При движении по асфальтному покрытию, не превышайте скорость 60 км/ч. При движении по грунтовым дорогам не превышайте 20 км/ч.

**ВНИМАНИЕ! ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФЕКТАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ МЕБЕЛИ И КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА!**

Не нарушайте сроки проведения технического осмотра и регламентных работ. Все работы проводите в полном объеме.

Для длительного сохранения транспортного средства в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.

## 6. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА

| №  | Опасная ситуация                                                                                                                                                                  | Вред                                                                 | Возможная причина                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1. Перегрев кабельных токопроводящих жил при подключении к преобразователю мощностью более 3000 Вт.<br>2. Перегрев нагревательных приборов.                                       | Поражение током. Термические ожоги.                                  | 1. Внешнее сетевое напряжение.<br>2. Механическое разрушение корпуса, нарушение изоляции. 3. Подключение непредусмотренных устройств, имеющих подобные разъемы.<br>4. Подключение устройств с видимыми повреждениями. |
| 2  | Превышение дозы ионизирующего излучения                                                                                                                                           | Переоблучение пациентов и персонала                                  | 1. Недостаточное экранирование ионизирующего излучения – нарушение при проектировании изделия и монтаже                                                                                                               |
| 3  | 1. Попадание частей тела персонала и пациентов между движущимися элементами оборудования<br>2. Небезопасное размещение рабочих мест персонала и приема пациентов в кузове-фургоне | Причинение физического вреда пациенту (травмы, переломы)             | Близкое расстояние от элементов оборудования, имеющего движущиеся части до рабочих мест персонала и приема пациентов                                                                                                  |
| 4  | При входе и выходе из транспортного средства появляется возможность оступиться или поскользнуться                                                                                 | Причинение физического вреда пациенту (травмы, переломы)             | Опасная проступь входных лестниц и трапов транспортного средства                                                                                                                                                      |
| 5  | При перемещении людей внутри транспортного средства можно задеть выступающие элементы мебели                                                                                      | Ушибы и поверхностные повреждения тела у персонала и пациентов       | Мебель и ее выступающие элементы имеют травмоопасные выступы и мешают проходу персонала и пациентов внутри транспортного средства                                                                                     |
| 6  | 1. Выделение аллергических компонентов внутренними поверхностями транспортного средства<br>2. Концентрация вредных химических веществ в салоне Комплекса.                         | Аллергические реакции пациентов                                      | Неэффективная методика выбора и оценки поставщиков, изделия которых имеют контакт с телом человека                                                                                                                    |
| 7  | Проведение дозиметрического контроля не поверенными средствами контроля или средствами контроля с просроченной поверкой                                                           | Переоблучение пациентов и персонала пациентов за пределами комплекса | Несоблюдение графика поверки оборудования                                                                                                                                                                             |
| 8  | Несоблюдение правил и условий хранения или эксплуатация изделия в неустановленных условиях.                                                                                       | Снижение срока службы изделия. Отказ изделия.                        | Нарушение правил и условий хранения.                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Недостаточное знание медицинского изделия пользователем и неэффективное использование.                                                                                            | Потеря диагностической или иной информации.                          | Недостаточное обучение. Недостаточная квалификация персонала.                                                                                                                                                         |
| 11 | Некорректное техническое обслуживание из-за недостаточного знания медицинского изделия пользователем.                                                                             | Потеря диагностической или иной информации.                          | Недостаточное обучение. Недостаточная квалификация персонала.                                                                                                                                                         |
| 12 | Нарушение электрической/механической целостности изделия (Погодные усло-                                                                                                          | Выход из строя, повреждение изделия                                  | Удар, вибрация, ветер.                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | вия).                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                              |
| 13 | Использование непонятных/неверных руководств                                  | Неэффективное использование изделия                                                             | Недостаточная информация в руководстве по эксплуатации                                                       |
| 14 | Недостаточное владение и понимание персоналом рабочих инструкций              | Неэффективное использование изделия                                                             | Большой объем информации в руководстве по эксплуатации                                                       |
| 15 | Несоблюдение инструкций по демонтажу и утилизации                             | Повреждение электрической сети. Поражение электрическим током. Нанесение вреда окружающей среде | Несоответствие порядка утилизации изделия                                                                    |
| 16 | Несрабатывание пожарной сигнализации из-за несоблюдения инструкции по монтажу | Выход из строя, повреждение изделия. Персонал и пациенты могут получить травмы                  | Монтаж пожарной сигнализации организацией, не имеющей разрешительные документы и опыт.                       |
| 17 | Несрабатывание огнетушителя                                                   | Персонал и пациенты могут получить травмы                                                       | Неисправный огнетушитель                                                                                     |
| 18 | Слишком мощное звуковое оборудование                                          | Персонал и пациенты могут получить повреждение слуха                                            | Установка оборудования, не соответствующего установленным требованиям к допустимым уровням звуковой мощности |

## 7. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Для воспрепятствования появления коррозии необходимо не менее 2х раз в год смазывать соединительные элементы трапов, окон будки, петли дверей и ящиков.

Обслуживание медицинской техники, входящей в состав Комплекса, производится согласно регламентам производителей и инструкциям по эксплуатации, являющимся неотъемлемой частью документации поставляемой вместе с Комплексом.

### Перечень регламентных работ на сплит – системах:

#### А. Проверки на обесточенном оборудовании:

- Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла и дренажной воды.
- Проверка и протяжка контактов электрических соединений.
- Проверка отсутствия проводимости силовой цепи - корпус кондиционера.
- Проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей контакторов, соленоидных вентилей.
- Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов.
- Чистка воздушных фильтров внутреннего блока.
- Проверка чистоты (при необходимости чистка - не менее 2-х раз в год) теплообменника наружного блока кондиционера.

#### Б. Проверки на включенном оборудовании:

- Проверка кондиционера на отсутствие посторонних шумов.
- Проверка направления и свободы вращения крыльчаток вентиляторов.
- Измерение рабочих токов электродвигателей кондиционера в рабочих режимах кондиционера.
- Измерение параметров холодильного контура в рабочих режимах.
- Измерение параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах.
- Оценка состояния кондиционера.
- При обнаружении отклонений в работе кондиционера - планирование и проведение ремонтных или других работ.

#### **В. Сезонная регулировка режимов:**

- Выполняется для оборудования оснащенного зимним комплектом, работа которого предусматривается зимой в режиме «Холод», в октябре - ноябре.
- Проверка и регулировка работы замедлителя вентилятора зимнего комплекта.
- Проверка исправности нагревателя картера.
- Проверка исправности нагревателя дренажа.

#### **Перечень регламентных работ на тепловую завесу:**

Фильтр необходимо чистить регулярно, поскольку загрязнение будет снижать эффективность работы завесы и ее тепловую мощность. Степень загрязнения фильтра и периодичность чистки определяется местными условиями эксплуатации.

**До проведения каких-либо работ, завесу необходимо обесточить.**

1) Обесточьте завесу.

2) Ослабьте винты и откройте сервисный люк, повернув защелки на 90°.

3) Фильтр можно чистить пылесосом или прополоскать в слабо-мыльном растворе. Перед установкой просушить. Замена необходима в случае повреждения или сильной загрязненности моторы вентиляторов и другие элементы не требуют специального обслуживания за исключением периодической очистки. Необходимая периодичность определяется конкретными условиями, но должна производиться не менее 2-х раз в год. Решетки, элементы вентиляторы и внутренние поверхности очищаются с помощью пылесоса или влажной тряпкой. Применение сильнодействующих очистителей не рекомендуется.

**Перечень регламентных работ на автономный электрогенератор прописано в инструкции по эксплуатации генератора, входящей в комплект документации при поставке.**

### **Перечень регламентных работ на огнетушители:**

Огнетушители диагностируются, обслуживаются, ремонтируются, перезаряжаются (заряжаются) и освидетельствуются только в специализированных пунктах технического обслуживания огнетушителей (ПТОО) имеющих лицензию на выполнение этих работ.

- огнетушители всех типов диагностируются 1 раз в год.
- порошковые огнетушители перезаряжаются 1 раз в два года, а углекислотные 1 раз в 5 лет.
- после использования огнетушителя (тушение загорания, тренировка или случайное срабатывание) огнетушители обязательно перезаряжаются.

### **Перечень регламентных работ на пожарную сигнализацию:**

#### **1) Ежемесячно проверять:**

- работоспособность основных и резервных источников питания;
- работоспособность звуковых и световых оповещателей;
- техническое состояние разъемов шлейфов сигнализации, мониторингового и дополнительного оборудования информационных линий и линий электропитания.

2) Не менее 2-х раз в год проводить внешний осмотр составных частей охранно-пожарной сигнализации (приемно-контрольных панелей, извещателей, резервных источников питания, шлейфов сигнализации и кабелей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, окисления, а также прочности их крепления и т. д.

Провести техническое диагностирование приборов по методикам производителя. Проверить работоспособность систем в целом.

### **Перечень регламентных работ на рукомойники накопительного типа:**

Не менее 2-х раз в год проверять исправность нагревательного элемента и очищать его от накипи специальными средствами.

### **Перечень регламентных работ на промышленные вентиляторы:**

1. Замена защитной сетки раз в год
2. Лопасти вентилятора очищаются от пыли пылесосом или прополаскиваются в слабомыльном растворе

## **8. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Комплекс может транспортироваться в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида своим ходом или авиационным, водным и железнодорожным транспортом без разборки, а также с разборкой на шасси и кузов-фургон в соответствии с договором на поставку.

При транспортировании железнодорожным транспортом, размещение и крепление на открытой платформе или в вагоне должно выполняться в соответствии с требованиями ЦМ-943 «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» МПС России, а также эксплуатационной документации на Комплекс и базовое транспортное средство.

При погрузочных и разгрузочных работах должны быть приняты меры для защиты Комплекса от механических повреждений.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Комплекс должен храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 1 года. При хранении необходимо учитывать требования к хранению базового транспортного средства и требованиям по хранению других комплектующих изделий.

Если после указанного срока Комплекс не вводится в эксплуатацию, то необходимо произвести его консервацию в соответствии с ГОСТ 9.014 с целью обеспечения его сохранности и работоспособности.

При хранении в закрытых помещениях более 1 месяца производится очистка Комплекса; увеличивается давление воздуха в шинах на 0,5 бара от номинального значения; отпускается стояночный тормоз и устанавливаются противооткатные башмаки; отсоединяется аккумуляторная батарея и связываются кабельные наконечники и зажимы.

При хранении под открытым небом более 1 месяца проводятся те же самые работы, что и при хранении в закрытых помещениях, а также отводятся стеклоочистители от ветрового стекла; закрываются все отверстия для впуска воздуха и устанавливается система отопления на «Выкл.»; демонтируется аккумуляторная батарея и хранится в соответствии с информацией изготовителя.

На площадках хранения Комплекс должен быть размещен с устройством проездов и проходов, обеспечивающих безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ, уборку территории.

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация транспортного средства, полуприцепа согласно требованиям заводов изготовителей, указанных в инструкциях на изделия.

Утилизация медицинских изделий и специального оборудования осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Утилизации медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

## 10. РЕКЛАМАЦИЯ.

Рекламации на обнаруженные дефекты, неисправности или поломки в течение гарантийного срока направляются в сервисную службу ЗАО «НПО «МЕДКАР»:

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206.

Телефон: +7 (495) 540-45-96. E-mail: [med@medcar.ru](mailto:med@medcar.ru).

После рассмотрения рекламации изделия или принадлежности, подпадающие под эту гарантию, бесплатно ремонтируются или заменяются.

## 11. СПИСОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ.

| № п/п                           | Наименование/тип                                                                                                                                                                                                                     | Обозначение документа, изготовитель                                                   | Кол. | Примечание        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>Медицинское оборудование</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |      |                   |
| <b>Кабинет «Гинекология»</b>    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |      |                   |
| 1.                              | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                            | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)                                   | 1    | При необходимости |
| 2.                              | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                                   | 1    | При необходимости |
| 3.                              | Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01                                                                                                                                  | Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499) | 1    | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |   |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 4.  | Кольпоскоп КС-01 по ТУ 9442-001-52132018-2003                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО «Здоровый Мир»,<br>Россия<br>(РЗН 2013/733)                                          | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 5.  | Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018                                                                                                                                            | Производство:<br>ООО «Здоровый<br>Мир», Россия<br>( РЗН 2019/8462)                                        | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 6.  | Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013                                                                | Производство:<br>ООО ПКФ «Современная<br>импедансная медицин-<br>ская техника», Россия<br>(РЗН 2014/2264) | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 7.  | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                                                       | Производство:<br>ООО "МЕДПЛАНТ".<br>Россия<br>(ФСР 2008/02305)                                            | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 8.  | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                              | Производство:<br>ООО «МЕДПЛАНТ»,<br>Россия<br>(ФСР 2010/08890)                                            | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 9.  | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150                                                                                      | Производство:<br>ОАО «Тулиновский<br>приборостроительный<br>завод «ТВЕС», Россия<br>(ФСР 2011/09964)      | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 10. | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП                                                                                            | Производство:<br>ОАО «Тулиновский<br>приборостроительный<br>завод «ТВЕС», Россия<br>(ФСР 2011/11607)      | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 11. | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003                                           | Производство:<br>ООО «НПП «Монитор»,<br>Россия<br>(ФСР 2012/14015)                                        | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 12. | Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель ri-magic LED                                                                                     | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмБХ»,<br>Германия (ФСЗ<br>2012/12398)                                   | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 13. | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009                                                                                                   | Производство:<br>ООО "Полимерные<br>изделия", Россия (ФСР<br>2010/07047)                                  | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 14. | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С | Производство:<br>АО "Елатомский<br>приборный завод",<br>Россия (РЗН 2016/3585)                            | 1 | При<br>необхо-<br>димости |
| 15. | Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003                                                                                                                     | Производство:<br>Можайский МИЗ, Россия<br>(ФСР 2007/00787)                                                | 1 | При<br>необхо-<br>димости |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |            |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 16.                          | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Производство: ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332)                                  | 1          | При необходимости |
| 17.                          | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство: Биохемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)                         | 1          | При необходимости |
| 18.                          | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)                                           | 1          | При необходимости |
| 19.                          | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100)                                    | 1          | При необходимости |
| 20.                          | Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса Модель: PRO-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство; B.Well Swiss AG, Швейцария (РЗН 2016/4964)                                          | 1          | При необходимости |
| 21.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство: ООО «Научно-производственная фирма Костромская медтехника», Россия (ФСР 2008/03973) | 1          | При необходимости |
| 22.                          | Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)                                               | Не более 3 | При необходимости |
| <b>Кабинет «Диагностика»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |            |                   |
| 1.                           | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБН2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)                                               | 1          | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 2.  | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                                      | 1 | При необходимости |
| 3.  | Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED                                                                                                                             | Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12398)                           | 1 | При необходимости |
| 4.  | Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01                                                                                                                                  | Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)    | 1 | При необходимости |
| 5.  | Авторефрактометр RC-5000 с принадлежностями                                                                                                                                                                                          | Производство: «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726)                                 | 1 | При необходимости |
| 6.  | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭС                                                                                                                                    | Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607) | 1 | При необходимости |
| 7.  | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                           | Производство: Биохемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)                | 1 | При необходимости |
| 8.  | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-«Мединт-М» по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                                                                                               | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2008/02305)                                    | 1 | При необходимости |
| 9.  | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-«Мединт-М» по ТУ 9437-010-18585567-2004                                                                                                           | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (РЗН 2014/1928)                                     | 1 | При необходимости |
| 10. | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ                                                                                                   | Производство: ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия (ФСР 2010/07332)                         | 1 | При необходимости |
| 11. | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                                                                      | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/08890)                                    | 1 | При необходимости |
| 12. | Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)                                                                                                                                                     | Производство: «АйЭнди Диагностика Инк.», Канада (ФСЗ 2010/07039)                         | 1 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 13. | Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями                                                                                                | Производство:<br>«Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР<br>(ФСЗ 2008/01996) | 1 | При необходимости |
| 14. | Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями                                                                                                         | Производство:<br>"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629).   | 1 | При необходимости |
| 15. | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003                  | Производство:<br>ООО «НПП «Монитор», Россия<br>(ФСР 2012/14015)                                  | 1 | При необходимости |
| 16. | Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018                                                                                  | Производство:<br>ООО "Нейрософт", Россия<br>(ФСР 2009/05172)                                     | 1 | При необходимости |
| 17. | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101                                               | Производство:<br>«Фукуда Дэнси Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4703)                                | 1 | При необходимости |
| 18. | Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222                                                                                                  | Производство:<br>ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379)                                 | 1 | При необходимости |
| 19. | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями                               | Производство:<br>ООО "Альтомедика", Россия.<br>(РЗН 2013/809)                                    | 1 | При необходимости |
| 20. | Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017 | Производство:<br>Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия<br>(РЗН 2019/8513)    | 1 | При необходимости |
| 21. | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I                                                                  | Производство:<br>«МИР С.р.л. – МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ», Италия<br>(РЗН 2017/5323)             | 1 | При необходимости |
| 22. | Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe                                                                                         | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207)                                | 1 | При необходимости |
| 23. | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                               | Производство:<br>«3М Компания, 3М Хеле Кеар», США<br>(РЗН 2016/4622)                             | 1 | При необходимости |
| 24. | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп ri-derma                                                                    | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия<br>(ФСЗ 2009/03906)                             | 1 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 25. | Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: УХ300, УХ301                                                                                                                         | Производство: "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461) | 1 | При необходимости |
| 26. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150                                                                                      | Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) | 1 | При необходимости |
| 27. | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНД-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002                                                                           | Производство: ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958) | 1 | При необходимости |
| 28. | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck, C-128 Гц                                            | Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456)                           | 1 | При необходимости |
| 29. | Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним                                                                                                            | Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03908)                           | 1 | При необходимости |
| 30. | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                                                       | Производства: ООО «Полимерные изделия», Россия (ФСР 2010/07935)                          | 1 | При необходимости |
| 31. | Носилки жесткие НЖ-ММ по ТУ 9451-003-10660186-00                                                                                                                                             | Производство: ООО "НПП "Микромонт", Россия (ФСР 2010/07236)                              | 1 | При необходимости |
| 32. | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008                                                                                                                         | Производство: ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509)                              | 1 | При необходимости |
| 33. | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д        | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2007/00439)                                    | 1 | При необходимости |
| 34. | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004                                                                   | Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928)                                     | 1 | При необходимости |
| 35. | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С | Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)                    | 1 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 36. | Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС" (OPTIONIX®) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Производство: ЗАО «НПО «МЕДКАР» (РЗН 2020/10607)                      | 1 | При необходимости |
| 37. | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Производство: ООО Пневмоприбор, Россия (ФСР 2009/ 06204)              | 1 | При необходимости |
| 38. | Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, варианты исполнений: ТСП-3000 Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Производство: Томэй ГмБХ, Германия (ФСЗ 2010/07992)                   | 1 | При необходимости |
| 39. | Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Производство: «Рексам Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4151)              | 1 | При необходимости |
| 40. | Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Производство: ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00471)           | 1 | При необходимости |
| 41. | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство: АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997) | 1 | При необходимости |
| 42. | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Производство: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05422)      | 1 | При необходимости |
| 43. | Набор для минитрахеостомии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство: "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" (ФСЗ № 2009/05211)   | 1 | При необходимости |
| 44. | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм | Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335)                 | 1 | При необходимости |
| 45. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                    | Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)               | 1 | При необходимости |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 46.                          | Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"                                                                                                                                                                                                                                 | Производство:<br>АО "ПОЗИС", Россия<br>(ФСР 2009/05705)                                                           | 2                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 47.                          | Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производства:<br>"Шэньчжэнь Майндрэй<br>Био-Медикал<br>Электроникс Ко., Лтд.",<br>КНР (РЗН 2017/6115)             | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 48.                          | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B (M110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство:<br>Метракс ГмбХ, Германия<br>(ФСЗ 2011/10093)                                                       | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 49.                          | Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Производство:<br>ООО "Медицинские<br>компьютерные системы",<br>Россия (ФСР 2007/00155)                            | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 50.                          | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014 Варианты исполнения: 3. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-01-«МЕДПЛАНТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство :<br>ООО «МЕДПЛАНТ»,<br>Россия (РЗН 2015/2746) –<br>1 шт.                                            | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 51.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство:<br>ООО «Научно-<br>производственная фирма<br>Костромская<br>медтехника», Россия<br>(ФСР 2008/03973) | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 52.                          | Стол�ы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия<br>(РЗН 2013/1292)                                                         | Не<br>бо-<br>лее<br>3 | При<br>необхо-<br>димости |
| <b>Кабинет «Лаборатория»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |                           |
| 1.                           | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБН2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия<br>(ФСР 2011/12132)                                                         | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 2.  | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»   | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                              | 1 | При необходимости |
| 3.  | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                               | Производство: «Полимер Технолоджи Системс, Инк.», США (РЗН 2015/2693)            | 1 | При необходимости |
| 4.  | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009                                      | Производство: ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498)                      | 1 | При необходимости |
| 5.  | Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus                                                                                                                                                             | Производство: «Хай Текнолоджи, Инк.», США (РЗН 2016/3986)                        | 1 | При необходимости |
| 6.  | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                             | Производство: «Хай Текнолоджи, Инк.», США (ФСЗ 2010/07756)                       | 1 | При необходимости |
| 7.  | Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch®, вариант исполнения: EasyTouch® GCHb, производство Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань (ФСЗ 2011/10454) – 1 шт. 8. Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини) | Производство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342)                        | 1 | При необходимости |
| 8.  | Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)                                                                                                                                                                        | Производство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342)                        | 1 | При необходимости |
| 9.  | Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями                                                                                                                                                                   | Производство: Вест Медика Продукционс-унд Хайдельс-ГмбХ, Австрия (РЗН 2017/5740) | 1 | При необходимости |
| 10. | Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями                                                                                                                                | Производство: «Диессе Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия (РЗН 2019/9149)         | 1 | При необходимости |
| 11. | Анализатор мочи DocUReader с принадлежностями, исполнения: DocUReader                                                                                                                                                                  | Производство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (ФСЗ 2012/13515)                       | 1 | При необходимости |
| 12. | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                             | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/10034)                              | 1 | При необходимости |
| 13. | Система для измерения уровня гемоглобина НемоControl с принадлежностями                                                                                                                                                                | Производство: "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия (ФСЗ 2008/02911)                   | 1 | При необходимости |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 14.                         | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                                  | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 15.                         | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Производство:<br>ООО «МЕДПЛАНТ»,<br>Россия<br>(ФСР 2010/08890)                                                    | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 16.                         | Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство:<br>АО "Елатомский<br>приборный завод",<br>Россия (РЗН 2016/3585)                                    | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 17.                         | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>«Ченгду Рич Сайенс<br>Индастри Ко., Лтд.»,<br>Китай (ФСЗ 2010/06301)                             | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 18.                         | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                                  | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 19.                         | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство:<br>ООО «Научно-<br>производственная фирма<br>Костромская<br>медтехника», Россия<br>(ФСР 2008/03973) | 1                     | При<br>необхо-<br>димости |
| 20.                         | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия<br>(РЗН 2013/1292)                                                         | Не<br>бо-<br>лее<br>3 | При<br>необхо-<br>димости |
| <b>Кабинет «Вакцинация»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                       |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1.  | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                              | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                                 | 1 | При необходимости |
| 2.  | Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")                                                                                 | Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)                                   | 1 | При необходимости |
| 3.  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                         | Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)                                 | 1 | При необходимости |
| 4.  | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010. Вариант исполнения: - в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2, без ларингоскопа | Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», (ФСР 2010/07335)                                      | 1 | При необходимости |
| 5.  | Дозаторы для дезинфицирующих средств и мыла. Модель UD-9000 бесконтактный дозатор                                                                                                                                                                                 | Производство: "Саяра Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2017/6270)                             | 1 | При необходимости |
| 6.  | Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)                                                                                                                                                                                                | Производство: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05423)                    | 1 | При необходимости |
| 7.  | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU)                                                                                                                                                                | Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (РЗН 2015/3210)                       | 1 | При необходимости |
| 8.  | Пульсоксиметр gi-fox                                                                                                                                                                                                                                              | Производство: "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00483)                      | 1 | При необходимости |
| 9.  | Шкафы медицинские ПАКС металл по ТУ 9452-002-96303248-2016. Варианты исполнения: V. Шкафы медицинские серии АМ: - Шкаф медицинский АМ-1.                                                                                                                          | Производство: ООО "ПАКС-трейд", Россия (РЗН 2017/5700)                              | 1 | При необходимости |
| 10. | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015. Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05                                                                                                                        | Производство: ООО Концерн "Аксион" Россия (РЗН 2017/5391)                           | 1 | При необходимости |
| 11. | Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008. Лоток почкообразный ЛМП - "МЕДИКОН", размерами в мм: 200 x 120 x 30                                                                                                                   | Производство: ООО "Научно-производственная фирма "МЕДИКОН", Россия (ФСР 2008/03233) | 1 | При необходимости |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |            |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 12. | Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХМЕД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство:<br>"Апексмед Интернэшнл Б. В.", Нидерланды<br>(ФСЗ 2011/10188)                                     | 1          | При необходимости |
| 13. | Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Дезиптол". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-003-17156278-2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производство:<br>ООО "Компания" НПХ", Россия<br>ЗАО НПО "Химсинтез", Россия<br>(RU.77.99.88.002.E.00156 9.04.18) | 1          | При необходимости |
| 14. | Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ) по ТУ 9398-035-42965160-2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Производство:<br>ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия<br>(ФСР 2008/02391)                                          | 1          | При необходимости |
| 15. | Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Производство:<br>АО "КАМПО", Россия<br>(ФСР 2011/09914)                                                          | 1          | При необходимости |
| 16. | Морозильник биомедицинский глубокой заморозки модели DW-40 с принадлежностями<br>вариант исполнения: DW-40L92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производство:<br>"Циндао Хайер Биомедикал Ко., Лтд.", Китай (ФСЗ 2012/13474)                                     | 1          | При необходимости |
| 17. | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство:<br>АО "Елатомский приборный завод", Россия<br>(РЗН 2016/3585)                                      | 3          | При необходимости |
| 18. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "ГК "Респект", Россия<br>(РЗН 2013/1089)                                                    | 1          | При необходимости |
| 19. | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | Производство:<br>ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия<br>(ФСР 2008/03973)            | Не более 3 | При необходимости |
| 20. | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия<br>(РЗН 2013/1292)                                                        | Не более 3 | При необходимости |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |   |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 21.                                                    | Термоконтейнеры для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов с охлаждающими элементами по ТУ 9452-002-29927143-2014, вариант исполнения МТП-L9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Производство:<br>ООО "МТП", Россия<br>(РЗН 2015/3413)                | 1 | При необходимости |
| 22.                                                    | Изделия для фиксации ёмкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО "МЕДПЛАНТ",<br>Россия (РЗН 2014/1603)           | 1 | При необходимости |
| 23.                                                    | Полотенца универсальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Производство:<br>ООО "Авангард", Россия                              | 1 | При необходимости |
| 24.                                                    | Пеленки одноразовые впитывающие "iD", размеры: 40x60; 60x60; 60x90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство:<br>"Онтекс БВ", Россия<br>(РЗН 2017/6287)              | 1 | При необходимости |
| 25.                                                    | Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по ТУ 9398-001-37492896-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Производство:<br>ООО "ПКФ<br>"Медкомплект", Россия<br>(РЗН 2013/238) | 1 | При необходимости |
| 26.                                                    | Набор "Аптечка ПРОТИВОШОКОВАЯ (АнтиШок) в составе:<br>1. Преднизолон Эльфа, рег № ЛС-000078<br>2. Супрастин РУ № П N012426/02<br>3. Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см3 (мл), 2 см3 (мл), 3 см3 (мл), 5 см3 (мл), 10 см3 (мл), 20 см3 (мл), 30 см3 (мл), 50 см3 (мл), 60 см3 (мл), 100 см3 (мл), 150 см3 (мл) с иглами и без. № РУ ФСЗ 2009/03552<br>4. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные типа "Луер" (с манжетой) в комплекте с иглой инъекционной, стерильные по ТУ 9398-006-81136323-2011. № РУ ФСР 2008/03544<br>5. Эуфиллин, ЛП-003461-160216 изм. №1<br>6. Адреналин-СОЛОфарм, ЛП-004465-190917 | Производство:<br>ООО "ПАРЕНТКОМ",<br>Россия                          | 1 | При необходимости |
| <b>Кабинет «Предрейсовых и послерейсовых осмотров»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |   |                   |
| 1.                                                     | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Производство:<br>АО «КРОНТ-М»,<br>Россия<br>(ФСР 2011/12132)         |   |                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                    |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2.  | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                             | Производство:<br>АО «КРОНТ-М»,<br>Россия<br>(ФСР 2011/11388)                                           | Не<br>бо-<br>лее 3 | При<br>необхо-<br>димости |
| 3.  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                        | Производство:<br>АО "КРОНТ-М", Россия<br>(ФСР 2011/12132)                                              | Не<br>бо-<br>лее 3 | При<br>необхо-<br>димости |
| 4.  | Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017                                                                                                              | Производство:<br>Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"САНРЭС", Россия (РЗН<br>2019/8513) | 1                  | При<br>необхо-<br>димости |
| 5.  | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200, производства "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689)                                                                                                   | Производство:<br>"Сентек Корея Корп.",<br>Корея (РЗН 2014/1689)                                        | 1                  | При<br>необхо-<br>димости |
| 6.  | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                             | Производство:<br>OMRON HEALTHCARE<br>Co., Ltd, Япония (ФСЗ<br>2009/05422)                              | 1                  | При<br>необхо-<br>димости |
| 7.  | Тесты NARCOSCREEN (тест-полоски, тест-кассеты) для выявления наркотических веществ в моче и слюне                                                                                                                                                                                | Производство:<br>"ИнТек Продактс, Инк.",<br>КНР (ФСЗ 2010/08095)                                       | 1                  | При<br>необхо-<br>димости |
| 8.  | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                            | Производство:<br>«ЗМ Компания, ЗМ Хеле<br>Кеар», США<br>(РЗН 2016/4622)                                | 1                  | При<br>необхо-<br>димости |
| 9.  | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                     | Производство:<br>АО "Елатомский<br>приборный завод", Россия<br>(РЗН 2016/3585)                         | 1                  | При<br>необхо-<br>димости |
| 10. | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ» | Производство:<br>ООО "ГК "Респект",<br>Россия (РЗН<br>2013/1089)                                       | Не<br>бо-<br>лее 2 | При<br>необхо-<br>димости |
| 11. | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                            | Производство:<br>ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко.,<br>Лтд., Япония (ФСЗ<br>2012/12100)                                | Не<br>бо-<br>лее 2 | При<br>необхо-<br>димости |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 12.                                                                 | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | Производство:<br>ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) | Не более 3 | При необходимости |
| 13.                                                                 | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292                                               | Не более 3 | При необходимости |
| <b>Кабинет «Передвижной пункт медицинского освидетельствования»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |                   |
| 1.                                                                  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)                                             | Не более 3 | При необходимости |
| 2.                                                                  | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство:<br>АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)                                             | Не более 3 | При необходимости |
| 3.                                                                  | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132)                                             | Не более 3 | При необходимости |
| 4.                                                                  | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Производство:<br>«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456)                                  | 1          | При необходимости |
| 5.                                                                  | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство:<br>«3М Компания, 3М Хеле Кеар», США (РЗН 2016/4622)                                  | 1          | При необходимости |
| 6.                                                                  | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство:<br>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05422)                                | Не более 2 | При необходимости |
| 7.                                                                  | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Производство:<br>OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100)                                  | Не более 2 | При необходимости |
| 8.                                                                  | Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов "АПИЛУЧ" СЦРГ.941439.002 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО "Битест", Россия (РЗН 2019/9481)                                              | 1          | При необходимости |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 9.                           | Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производство:<br>АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)                           | Не более 2 | При необходимости |
| 10.                          | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                              | Производство:<br>ООО "ГК "Ресpekt", Россия (РЗН 2013/1089)                                         | Не более 2 | При необходимости |
| 11.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ | Производство:<br>ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) | Не более 3 | При необходимости |
| 12.                          | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Производство:<br>ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292)                                              | Не более 3 | При необходимости |
| <b>Транспортное средство</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |                   |
| 1.                           | ПМК-48415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Производство:<br>ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                                           | 1          |                   |
| 2.                           | АЛ-59860С-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Производство:<br>ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                                           | 1          |                   |
| 3.                           | ПМК-5756С0-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Производство:<br>ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                                           | 1          |                   |
| 4.                           | 8724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Производство:<br>ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия                                                           | 1          |                   |
| 5.                           | 185514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Производство:<br>ООО «Форвард», Россия                                                             | 1          |                   |
| 6.                           | 385427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Производство:<br>ООО «Форвард», Россия                                                             | 1          |                   |
| 7.                           | 385527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Производство:<br>ООО «Форвард», Россия                                                             | 1          |                   |

|                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                              |            |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 8.                              | 71497-0000010                                                                                                                                                                 | Производство:<br>ООО «ДжиТиЭс-трейлер», Россия                               | 1          |  |
| <b>Специальное оборудование</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                              |            |  |
| 1.                              | Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 40                                                                                                                   | Производство:<br>«Webasto Thermo & Comfort SE», Германия                     | Не более 2 |  |
| 2.                              | Воздушный отопитель модели: Airtronic D4                                                                                                                                      | Производство:<br>Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия | Не более 2 |  |
| 3.                              | Воздушный отопитель AER D5                                                                                                                                                    | Производство:<br>«A100», Китай                                               | Не более 2 |  |
| 4.                              | Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ                                                                                                                                     | Производство:<br>ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия                                   | Не более 2 |  |
| 5.                              | Воздушная завеса Арктос Мини-3                                                                                                                                                | Производство:<br>ООО «Арктос», Россия                                        | не более 2 |  |
| 6.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                           | Производство:<br>“MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.”, Сингапур  | Не более 2 |  |
| 7.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель <a href="#">MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1</a> | Производство:<br>Midea Group, Китай                                          | Не более 2 |  |
| 8.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q                                  | Производство:<br>Midea Group, Китай                                          | Не более 2 |  |
| 9.                              | Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ                                                                               | Производство:<br>Mitsubishi Electric Corporation, Япония                     | Не более 2 |  |
| 10.                             | Сплит-система т.м. «Dometic»                                                                                                                                                  | Производство:<br>“Dometic Italy S.p.a.”, Италия                              | Не более 2 |  |
| 11.                             | Накрышный кондиционер Webasto cool top trail                                                                                                                                  | Производство:<br>«Webasto Thermo & Comfort SE», Германия                     | Не более 2 |  |
| 12.                             | Электрический кондиционер Autoclima                                                                                                                                           | Производство:<br>AUTOCLIMA, Италия                                           | Не более 2 |  |
| 13.                             | Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулирования микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU     | Производство:<br>«General Climate LTD», Китай                                | Не более 2 |  |
| 14.                             | Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3                                                                                                                            | Производство:<br>« <a href="#">Royal Clima</a> », Китай                      | Не более 2 |  |
| 15.                             | Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N)                                                                                                                                      | Производство:<br>«Haier» Китай                                               | Не более 2 |  |

|     |                                                                                                                            |                                                             |            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| 16. | Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC                                                                                  | Производство: «Hisense» Китай                               | Не более 2 |  |
| 17. | Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE                                                                                  | Производство: «Hisense» Китай                               | Не более 2 |  |
| 18. | Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN                                                                                 | Производство: « <a href="#">Royal Clima</a> », Китай        | Не более 2 |  |
| 19. | Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA                                                                                     | Производство: «Haier» Китай                                 | Не более 2 |  |
| 20. | Мульти сплит-система, Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER1 *3 / MXZ-3HJ50VA ER1                                              | Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Тайланд      | Не более 2 |  |
| 21. | Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMEX», модели: SH6500EX-R, SH11000-R, SH760EX                               | Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония          | 1          |  |
| 22. | Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116                                                                              | Производство: «Kubota Corporation», Япония                  | 1          |  |
| 23. | Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC                                                                               | Производство: «TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD» Япония       | 1          |  |
| 24. | Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500                                                                                  | Производство: ЗАО «Зубр ОВК»                                | 1          |  |
| 25. | Генератор Fubag TI 4300                                                                                                    | Производство: «Fubag», Германия                             | 1          |  |
| 26. | Бензиновый генератор Denzel GT-2600i (2300 Вт)                                                                             | Производство: «MATRIZE Handels GmbH», Германия.             | 1          |  |
| 27. | Бензиновый генератор «Energio», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE                                      | Производство: «Energio» Россия                              | 1          |  |
| 28. | Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA                                                                  | Производство: «Briggs & Stratton» США                       | 1          |  |
| 29. | Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E                                                                              | Производство: «Yamaha», Китай, Япония                       | 1          |  |
| 30. | Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E                               | Производитель: «ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», Китай  | 1          |  |
| 31. | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4, Spote E-5 Plus                     | Производство: «Noirot S.A.S.», Франция                      | не более 6 |  |
| 32. | Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11                                                   | Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия | не более 6 |  |
| 33. | Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000 | Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия | не более 6 |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |            |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| 34.                        | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель ВНС-L08-T03                                                                                                                                  | Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия | не более 2 |  |
| 35.                        | Прибор приемно-контрольный охран-ный, модель Кварц вариант 2                                                                                                                                                                                              | Производство: ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия           | 1          |  |
| 36.                        | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120                                                                                                                     | Производство: ООО «Версет», Россия                          | 1          |  |
| 37.                        | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO                                                                                                                                                                               | Производство: ООО «МикроАрт», Россия                        | 1          |  |
| 38.                        | Установка вентиляционная, модель Breezart                                                                                                                                                                                                                 | Производство: ООО «КЛИМАТСОФТ», Россия                      | 1          |  |
| 39.                        | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                                                                                                                                                   | Производство: ООО «ВАНВЕНТ», Россия                         | 1          |  |
| 40.                        | Сенсорный дозатор для антисептика и мыла UD-9000                                                                                                                                                                                                          | Производство: "Sagaya", Япония                              | 1          |  |
| 41.                        | Биотуалет Thetford Porta Potti                                                                                                                                                                                                                            | Производство: "Thetford", Нидерланды                        | 1          |  |
| 42.                        | Холодильник ВВК, RF-068                                                                                                                                                                                                                                   | Производство: ВВК Electronics LTD, КНР                      | не более 2 |  |
| <b>Встраиваемая мебель</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |            |  |
|                            | «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Функциональная диагностика», «Лаборатория», «Гинекология», на базе транспортных средств ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724. |                                                             |            |  |
| 1.                         | Столешница для крепления к стенам БСП161500400                                                                                                                                                                                                            | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |
| 2.                         | Столешница для крепления к стенам БСП16900500                                                                                                                                                                                                             | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |
| 3.                         | Столешница для крепления к стенам БСП161500700                                                                                                                                                                                                            | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |
| 4.                         | Столешница для крепления к стенам БСП161000900                                                                                                                                                                                                            | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |
| 5.                         | Умывальник УД16400400                                                                                                                                                                                                                                     | МДКР.0010.000                                               | не более 4 |  |
| 6.                         | Шкаф настенный НШР800500300                                                                                                                                                                                                                               | МДКР.0010.000                                               | не более 3 |  |
| 7.                         | Кушетка-рундук КР1800600550                                                                                                                                                                                                                               | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |
|                            | «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Гинекология», на базе транспортного средства 185514                                                                                 |                                                             |            |  |
| 1.                         | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М.                                                                                                                                                                                          | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |
| 3.                         | Столешница для крепления к стенам БСП16800400.                                                                                                                                                                                                            | МДКР.0010.000                                               | 1          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП16300300.                  | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Диагностика», «Гинекология», на базе транспортного средства 385427 или 385527                                                       |                                                                 |                  |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161060970. | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161350400                  | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам 16800400                      | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1800600550                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                           | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Вакцинация», на базе транспортного средства 185514                                                                                  |                                                                 |                  |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1750600550                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                           | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161500700                  | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | ШОР1900420500                                                   | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | не более 6 |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: «Диагностика», «Предрейсовый осмотр», на базе транспортного средства 71497-0000010                                                   |                                                                 |                  |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161060970. | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161350400                  | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам 16800400                      | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1800600550                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| «Комплекс мобильный (центр лечебно-профилактический передвижной) по ТУ 9451-008-37600580-2012. Состоит из кабинетов: или Кабинет «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», кабинет «Вакцинация», на базе транспортного средства 71497-0000010 |                                                                 |                  |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161060970. | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам БСП161350400                  | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                        | Столешница для крепления к стенам 16800400                      | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                        | Кушетка-рундук КР1800600550                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                        | Шкаф настенный НШР800500300                                     | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                        | Умывальник УД16400400                                           | МДКР.0010.000    | 1          |  |
| <b>Эксплуатационная документация</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Руководство по эксплуатации                                     | МДКР.0010.000 РЭ | 1          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                        | Паспорт                                                         | МДКР.0010.000 ПС | 1          |  |

|    |                                                 |    |   |  |
|----|-------------------------------------------------|----|---|--|
| 3. | Эксплуатационные документы на<br>покупные части | РЭ | - |  |
|----|-------------------------------------------------|----|---|--|

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией настоящего Комплекса обращаться в  
ЗАО «Научно - производственное объединение «МЕДКАР»:

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

Адрес производства: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 10.

Тел.: +7 (495) 540-45-96.

E-mail: [med@medcar.ru](mailto:med@medcar.ru)

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

**Приложение 1**

**Габаритные размеры оборудования устанавливаемого в комплексе.**

| №<br>п/п                        | Наименование                                                                                                                                                                                                                         | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Медицинское оборудование</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                     |
| <b>Кабинет «Диагностика»</b>    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                     |
| 1.                              | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                            | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |
| 2.                              | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |
| 3.                              | Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01                                                                                                                                  | 1200 x 800 x 1500                                               | 100                 |
| 4.                              | Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018                                                                                                                                                                                    | 400 x 400 x 600                                                 | 16                  |
| 5.                              | Кольпоскоп КС-01 по ТУ 9442-001-52132018-2003                                                                                                                                                                                        | 400 x 400 x 600                                                 | 16                  |
| 6.                              | Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013                                                                                                        | 350 x 300 x 300                                                 | 4                   |
| 7.                              | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                                                                                               | 500 x 400 x 200                                                 | 3                   |
| 8.                              | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                                                                      | 350 x 300 x 300                                                 | 5                   |
| 9.                              | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150                                                                                                                              | 500 x 500 x 100                                                 | 2                   |
| 10.                             | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП                                                                                                                                    | 200 x 100 x 300                                                 | 1                   |
| 11.                             | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003                                                                                   | 500 x 500 x 800                                                 | 5                   |
| 12.                             | Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель ri-magic LED                                                                                                                             | 500 x 800 x 400                                                 | 10                  |
| 13.                             | Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009                                                                                                                                           | 200 x 100 x 100                                                 | 1                   |

| №<br>п/п                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.                          | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 x 150 x 100                                                 | 1                   |
| 15.                          | Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 x 150 x 100                                                 | 1                   |
| 16.                          | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |
| 17.                          | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 x 150 x 300                                                 | 1                   |
| 18.                          | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                  | 100 x 200 x 200                                                 | 1                   |
| 19.                          | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 x 200 x 200                                                 | 2                   |
| 20.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:<br>- стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | 1000 x 400 x 400                                                | 5                   |
| 21.                          | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 x 450 x 400                                                 | 5                   |
| <b>Кабинет «Диагностика»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| 1.                           | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |
| 2.                           | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                        | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.       | Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель ri-magic LED                                                            | 500 x 800 x 400                                                 | 10                  |
| 4.       | Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01                                                                 | 1200 x 800 x 1500                                               | 100                 |
| 5.       | Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями                                                                                                                        | 400 x 300 x 300                                                 | 1                   |
| 6.       | Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭС                                                                   | 200 x 100 x 300                                                 | 1                   |
| 7.       | Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in                          | 100 x 150 x 300                                                 | 1                   |
| 8.       | Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003                                                              | 500 x 400 x 200                                                 | 3                   |
| 9.       | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004                                          | 700 x 400 x 400                                                 | 3                   |
| 10.      | Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ                                  | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |
| 11.      | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                     | 350 x 300 x 300                                                 | 5                   |
| 12.      | Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)                                                                                    | 200 x 100 x 100                                                 | 1                   |
| 13.      | Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями                                                                                                | 1200 x 400 x 500                                                | 35                  |
| 14.      | Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями                                                                                                         | 700 x 400 x 400                                                 | 30                  |
| 15.      | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003                  | 500 x 500 x 800                                                 | 5                   |
| 16.      | Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/EX" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018                                                                                  | 500 x 450 x 700                                                 | 6                   |
| 17.      | Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101                                               | 500 x 400 x 400                                                 | 5                   |
| 18.      | Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222                                                                                                  | 450 x 400 x 150                                                 | 5                   |
| 19.      | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями,                              | 550 x 450 x 200                                                 | 5                   |
| 20.      | Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017 | 1100 x 450 x 400                                                | 30                  |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                 | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 21.      | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I                                                                                           | 400 x 300 x 200                                                 | 3                   |
| 22.      | Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe                                                                                                                  | 300 x 150 x 300                                                 | 1                   |
| 23.      | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                        | 100 x 200 x 50                                                  | 1                   |
| 24.      | Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп rī-derma                                                                                             | 200 x 100 x 100                                                 | 1                   |
| 25.      | Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: УХ300                                                                                                                                | 100 x 100 x 100                                                 | 1                   |
| 26.      | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150                                                                                      | 500 x 500 x 100                                                 | 2                   |
| 27.      | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002                                                                           | 700 x 400 x 450                                                 | 10                  |
| 28.      | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck, C-128 Гц                                            | 500 x 300 x 400                                                 | 8                   |
| 29.      | Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним                                                                                                            | 500 x 800 x 400                                                 | 10                  |
| 30.      | Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005                                                                                                                       | 100 x 200 x 50                                                  | 1                   |
| 31.      | Носилки жесткие НЖ-ММ по ТУ 9451-003-10660186-00                                                                                                                                             | 450 x 300 x 150                                                 | 7                   |
| 32.      | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008                                                                                                                         | 300 x 300 x 400                                                 | 12                  |
| 33.      | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д        | 500 x 200 x 400                                                 | 5                   |
| 34.      | Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004                                                                   | 700 x 400 x 400                                                 | 3                   |
| 35.      | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С | 300 x 400 x 400                                                 | 7                   |
| 36.      | Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС®" (OPTIUNIX®) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020                                                                                                 | 400 x 450 x 200                                                 | 5                   |
| 37.      | Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008                                                                                                                                     | 600 x 150 x 150                                                 | 5                   |
| 38.      | Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, варианты исполнения: ТСП-3000 Р                                                                                         | 700 x 500 x 300                                                 | 3                   |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 39.      | Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели ХЛ-1 в комплекте с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 x 500 x 400                                                 | 5                   |
| 40.      | Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 x 500 x 100                                                 | 5                   |
| 41.      | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 x 100 x 50                                                  | 1                   |
| 42.      | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 x 350 x 300                                                 | 1                   |
| 43.      | Набор для минитрахеостомии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 x 100 x 100                                                 | 1                   |
| 44.      | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм | 600 x 500 x 400                                                 | 15                  |
| 45.      | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ»                                                                                                                                   | 100 x 200 x 200                                                 | 1                   |
| 46.      | Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"                                                                                                                                                     | 450 x 400 x 200                                                 | 5                   |
| 47.      | Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 x 800 x 1400                                               | 30                  |
| 48.      | Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B (M110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000 x 500 x 150                                                | 10                  |
| 49.      | Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 x 200 x 100                                                 | 3                   |
| 50.      | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014 Варианты исполнения: 3. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ»                                                                                                                                                                                                                         | 500 x 450 x 400                                                 | 5                   |

| №<br>п/п                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5                            | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:<br>- стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | 1000 x 400 x 400                                                | 5                   |
| 5                            | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 x 450 x 400                                                 | 5                   |
| <b>Кабинет «Лаборатория»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| 1                            | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |
| 2.                           | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |
| 3.                           | Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 x 400 x 500                                                 | 15                  |
| 4.                           | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 x 150 x 50                                                  | 1                   |
| 5.                           | Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 x 200 x 100                                                 | 1                   |
| 6.                           | Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 x 400 x 500                                                 | 15                  |
| 7.                           | Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch®, вариант исполнения: EasyTouch® GCHb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 x 150 x 50                                                  | 1                   |
| 8.                           | Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 x 300 x 300                                                 | 5                   |
| 9.                           | Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 x 400 x 500                                                 | 15                  |
| 10.                          | Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 x 400 x 500                                                 | 4                   |
| 11.                          | Анализатор мочи DocUReader с принадлежностями, исполнения: DocUReader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 x 200 x 100                                                 | 3                   |

| №<br>п/п                    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.                         | Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 x 50 x 300                                                  | 1                   |
| 13.                         | Система для измерения уровня гемоглобина НемоControl с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 x 200 x 150                                                 | 2                   |
| 14.                         | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                   | 100 x 200 x 200                                                 | 1                   |
| 15.                         | Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-«Мединт-М» в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 x 300 x 300                                                 | 5                   |
| 16.                         | Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 x 150 x 100                                                 | 1                   |
| 17.                         | Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 x 200 x 100                                                 | 1                   |
| 18.                         | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях:<br>- стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | 1000 x 400 x 400                                                | 5                   |
| 19.                         | Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 x 450 x 400                                                 | 5                   |
| <b>Кабинет «Вакцинация»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |
| 1.                          | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |
| 2.                          | Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450 x 400 x 200                                                 | 5                   |
| 3.                          | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                     | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.       | Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010. Вариант исполнения: - в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2, без ларингоскопа                | 440 x 252 x 340                                                 | 10                  |
| 5.       | Дозаторы для дезинфицирующих средств и мыла, Модель UD-9000 бесконтактный дозатор                                                                                                                                                                                                | 350 x 200 x 200                                                 | 1                   |
| 6.       | Термометр электронный медицинский OMRON Eсо Temp Basic (MC-246-RU)                                                                                                                                                                                                               | 150 x 100 x 50                                                  | 0,5                 |
| 7.       | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU)                                                                                                                                                                               | 500 x 350 x 300                                                 | 1                   |
| 8.       | Пульсоксиметр gi-fox                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 x 100 x 100                                                 | 1                   |
| 9.       | Шкафы медицинские ПАКС металл по ТУ 9452-002-96303248-2016. Варианты исполнения: V. Шкафы медицинские серии АМ: - Шкаф медицинский АМ-1.                                                                                                                                         | 300 x 160 x 380                                                 | 2                   |
| 10.      | Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015. Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05                                                                                                                                       | 300 x 300 x 400                                                 | 7                   |
| 11.      | Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008. Лоток почкообразный ЛМП - "МЕДИКОН", размерами в мм: 200 x 120 x 30                                                                                                                                  | 200 x 120 x 30                                                  | 1                   |
| 12.      | Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХMED                                                                                                                                                                                                                            | 300 x 220 x 230                                                 | 4                   |
| 13.      | Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Дезиптол". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-003-17156278-2013.                                                                                                                                                    | 100 x 100 x 50                                                  | 1                   |
| 14.      | Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ) по ТУ 9398-035-42965160-2007                                                                                                                                                                                                               | 400 x 300 x 250                                                 | 4                   |
| 15.      | Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ                                                                                                                                                                                                                                        | 450 x 300 x 150                                                 | 7                   |
| 16.      | Морозильник биомедицинский глубокой заморозки модели DW-40 с принадлежностями вариант исполнения: DW-40L92                                                                                                                                                                       | 640 x 610 x 810                                                 | 25                  |
| 17.      | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                     | 250 x 150 x 100                                                 | 1                   |
| 18.      | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ» | 250 x 150 x 150                                                 | 1                   |

| №<br>п/п                                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 19.                                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.                                                                                                                                          | 1000 x 400 x 400                                                | 5                   |
| 20.                                          | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 x 450 x 400                                                 | 5                   |
| 21.                                          | Термоконтейнеры для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов с охлаждающими элементами по ТУ 9452-002-29927143-2014, вариант исполнения МТП-L9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 x 300 x 300                                                 | 4                   |
| 22.                                          | Изделия для фиксации ёмкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 x 100 x 100                                                 | 1                   |
| 23.                                          | Полотенца универсальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 x 200 x 100                                                 | 1                   |
| 24.                                          | Пеленки одноразовые впитывающие "iD", размеры: 40x60; 60x60; 60x90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 x 90 x 50                                                    | 1                   |
| 25.                                          | Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по ТУ 9398-001-37492896-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 x 100 x 50                                                  | 1                   |
| 26.                                          | Набор "Аптечка ПРОТИВОШОКОВАЯ (АнтиШок) в составе:<br>7. Преднизолон Эльфа, рег № ЛС-000078<br>8. Супрастин РУ № П N012426/02<br>9. Шприцы одноразовые стерильные объёмом 1 см3 (мл), 2 см3 (мл), 3 см3 (мл), 5 см3 (мл), 10 см3 (мл), 20 см3 (мл), 30 см3 (мл), 50 см3 (мл), 60 см3 (мл), 100 см3 (мл), 150 см3 (мл) с иглами и без. № РУ ФСЗ 2009/03552<br>10. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные типа "Луер" (с манжетой) в комплекте с иглой инъекционной, стерильные по ТУ 9398-006-81136323-2011. № РУ ФСР 2008/03544<br>11. Эуфиллин, ЛП-003461-160216 изм. №1<br>12. Адреналин-СОЛОфарм, ЛП-004465-190917 | 250 x 150 x 150                                                 | 3                   |
| <b>Предрейсовых и послерейсовых осмотров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                     |
| 1.                                           | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |

| №<br>п/п                                                  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.                                                        | Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |
| 3.                                                        | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |
| 4.                                                        | Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000x500x500                                                    | 25                  |
| 5.                                                        | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300x300x150                                                     | 3                   |
| 6.                                                        | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150x50x50                                                       | 1                   |
| 7.                                                        | Тесты NARCOSCREEN (тест-полоски, тест-кассеты) для выявления наркотических веществ в моче и слюне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100x50x100                                                      | 1                   |
| 8.                                                        | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300x50x100                                                      | 1                   |
| 9.                                                        | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 x 150 x 100                                                 | 1                   |
| 10.                                                       | Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | 250 x 150 x 150                                                 | 1                   |
| 11.                                                       | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 x 150 x 150                                                 | 1                   |
| 12.                                                       | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | 1000 x 400 x 400                                                | 5                   |
| 13.                                                       | Стол�ы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 x 450 x 400                                                 | 5                   |
| <b>Передвижной пункт медицинского освидетельствования</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                     |

| №<br>п/п                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.                           | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»                                                                                                                                                                                                                                                            | 1100 x 500 x 150                                                | 4                   |
| 2.                           | Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450 x 400 x 200                                                 | 5                   |
| 3.                           | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 x 400 x 150                                                 | 3                   |
| 4.                           | Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150x50x100                                                      | 1                   |
| 5.                           | Стетоскоп Littmann с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300x50x100                                                      | 1                   |
| 6.                           | Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150x50x50                                                       | 1                   |
| 7.                           | Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 x 350 x 300                                                 | 1                   |
| 8.                           | Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов "АПИЛУЧ" СЦРГ.941439.002 ТУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500x500x300                                                     | 10                  |
| 9.                           | Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 x 150 x 100                                                 | 1                   |
| 10.                          | Емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Емкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»                                                                                                                                                                                                                | 250 x 150 x150                                                  | 1                   |
| 11.                          | Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ. | 1000 x 400 x 400                                                | 5                   |
| 12.                          | Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800 x 450 x 400                                                 | 5                   |
| <b>Транспортное средство</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                     |
| 1.                           | ПМК-48415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10400 x 2550 x 3750                                             | 23980               |
| 2.                           | АЛ-59860С-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9750 x 2550 x 4000                                              | 21600               |


| №<br>п/п                        | Наименование                                                                                                                                                                  | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм | Вес, не более<br>кг |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.                              | ПМК-5756C0-2                                                                                                                                                                  | 10420 x 2550 x 3870                                             | 29000               |
| 4.                              | 8724                                                                                                                                                                          | 8100 x 2550 x 3970                                              | 10000               |
| 5.                              | 185514                                                                                                                                                                        | 6088 x 2206 x 2720                                              | 3500                |
| 6.                              | 385427                                                                                                                                                                        | 8150 x 2400 x 3200                                              | 6850                |
| 7.                              | 385527                                                                                                                                                                        | 7400 x 2400 x 3150                                              | 8700                |
| 8.                              | 71497-0000010                                                                                                                                                                 | 6200x2300x3200                                                  | 3500                |
| <b>Специальное оборудование</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                 |                     |
| 1.                              | Независимый воздушный и жидкостный отопитель<br>Air Top EVO 40                                                                                                                | 400 x 300 x 300                                                 | 5                   |
| 2.                              | Воздушный отопитель модели: Airtronic D4                                                                                                                                      | 400 x 300 x 300                                                 | 5                   |
| 3.                              | Воздушный отопитель AER D5                                                                                                                                                    | 389 x 140 x 140                                                 | 4,5                 |
| 4.                              | Промышленная воздушная завеса, модель: M3                                                                                                                                     | 600 x 200 x 400                                                 | 3                   |
| 5.                              | Воздушная завеса Арктикс Мини-3                                                                                                                                               | 400 x 250 x 200                                                 | 5                   |
| 6.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB                                           | 900 x 800 x 500                                                 | 30                  |
| 7.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель <a href="#">MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1</a> | 285 x 715 x 205                                                 | 26                  |
| 8.                              | Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q                                  | 890 x 673 x 342                                                 | 43.3                |
| 9.                              | Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ                                                                               | 650 x 700 x 500                                                 | 50                  |
| 10.                             | Сплит-система т.м. «Dometic»                                                                                                                                                  | 600 x 200 x 400                                                 | 20                  |
| 11.                             | Накрышный кондиционер Webasto cool top trail                                                                                                                                  | 600 x 400 x 500                                                 | 18                  |
| 12.                             | Электрический кондиционер Autoclima                                                                                                                                           | 500 x 450 x 450                                                 | 23                  |
| 13.                             | Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU       | 700 x 700 x 600                                                 | 45                  |
| 14.                             | Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3                                                                                                                            | 654 x 889 x 340                                                 | 48                  |
| 15.                             | Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N)                                                                                                                                      | 810 x 288 x 688                                                 | 51                  |
| 16.                             | Мульти-сплит система HAIER 4U75S2SR5FA                                                                                                                                        | 890 x 340 x 700                                                 | 61                  |
| 17.                             | Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC                                                                                                                                     | 950 x 840 x 340                                                 | 67                  |
| 18.                             | Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE                                                                                                                                     | 730 x 536 x 260                                                 | 33                  |
| 19.                             | Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN                                                                                                                                    | 554 x 800 x 333                                                 | 32                  |
| 20.                             | Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA                                                                                                                                        | 800 x 553 x 280                                                 | 54                  |
| 21.                             | Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMEX», модели: SH6500EX-R, SH11000-R, SH-7600EX                                                                                | 500 x 400 x 400<br>1000 x 800 x 600<br>708 x 548 x 493          | 35<br>50<br>78      |
| 22.                             | Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116                                                                                                                                 | 1500 x 1200 x 1500                                              | 380                 |
| 23.                             | Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC                                                                                                                                  | 1250 x 611 x 922                                                | 440                 |
| 24.                             | Бензиновый генератор «Energo», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE                                                                                          | 835 x 550 x 540<br>840 x 550 x 540<br>900 x 660 x 650           | 80<br>76<br>130     |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                          | Габаритные размеры<br>(Длина x Ширина x<br>Высота), не более мм                             | Вес, не более<br>кг             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 25.      | Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA                                                                             | 720 x 540 x 630                                                                             | 105                             |
| 26.      | Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E                                                                                         | 670 x 540 x 570                                                                             | 93                              |
| 27.      | Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000                                            | 700 x 530 x 590<br>700 x 530 x 590<br>700 x 530 x 590<br>770 x 600 x 790<br>690 x 530 x 560 | 83<br>90<br>99<br>138<br>85     |
| 28.      | Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500                                                                                             | 700 x 700 x 500                                                                             | 40                              |
| 29.      | Генератор Fubag TI 4300                                                                                                               | 450 x 450 x 500                                                                             | 30                              |
| 30.      | Бензиновый генератор Denzel GT-2600i (2300 Вт)                                                                                        | 600 x 500 x 300                                                                             | 65                              |
| 31.      | Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4, Spot E-5 Plus                                 | 1000 x 1000 x 300<br>420 x 440 x 80                                                         | 5<br>4,2                        |
| 32.      | Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11                                                              | 460x103x400<br>460x83x400                                                                   | 3,3<br>3,3                      |
| 33.      | Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000            | 480x111x413,<br>460x113x400<br>460x113x400<br>460x89x400<br>480x111x413                     | 3,56<br>3,3<br>3,3<br>3<br>3,44 |
| 34.      | Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель BHC-L08-T03              | 1000 x400 x 300                                                                             | 15                              |
| 35.      | Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2                                                                           | 300 x 300 x 100                                                                             | 5                               |
| 36.      | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120 | 280x103x35<br>254x165x39                                                                    | 0,5<br>0,6                      |
| 37.      | Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO                                                           | 600 x 400 x 200                                                                             | 25                              |
| 38.      | Установка вентиляционная, модель Breezart                                                                                             | 700 x 300 x 300                                                                             | 40                              |
| 39.      | Вентилятор промышленный, модель VANVENT                                                                                               | 200 x 200 x 100                                                                             | 1                               |
| 40.      | Сенсорный дозатор для антисептика и мыла UD-9000                                                                                      | 200 x 100 x 50                                                                              | 1                               |
| 41.      | Биотуалет Thetford Porta Potti                                                                                                        | 500 x 400 x 400                                                                             | 15                              |
| 42.      | Холодильник BBK, RF-068                                                                                                               | 445 x 620 x 465                                                                             | 18                              |


**Габаритные размеры и масса мебели, встраиваемой в Комплекс**  
Размеры выражены в мм

*Столешницы для крепления к стенам:*


**1) БСП161000900**

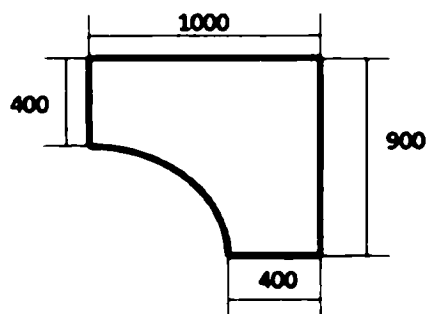


$m=12,6$  кг

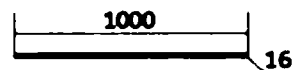


**2) БСП161500700**

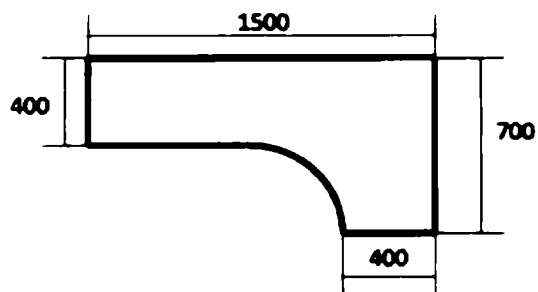


$m=14,3$  кг

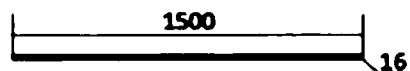


**3) БСП161060970**

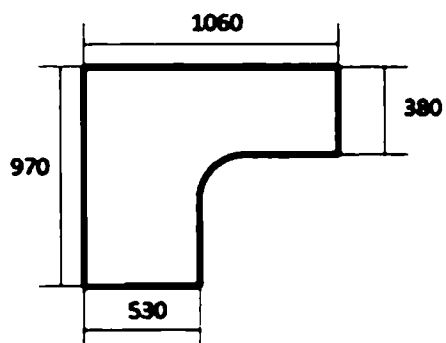


$m=14$  кг

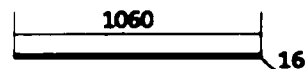


4) БСП16300300

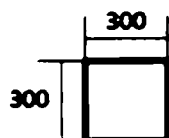


$m=4$  кг

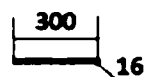


5) БСП16800400

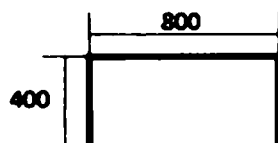


$m=8,5$  кг

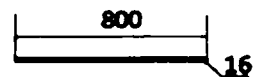


7) БСП161500400

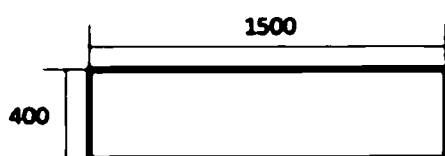


$m=13,1$  кг

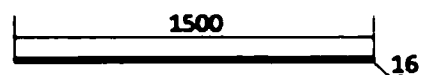

8) БСП161350400

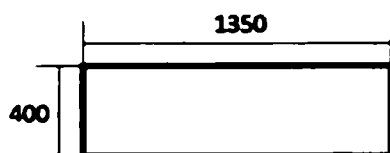


$m=12,3$  кг

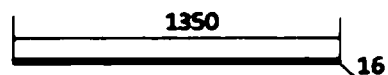


*Столешницы с мойкой для крепления к стенам и полу:*

9) БСП161140500М

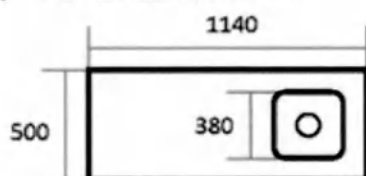


m=21,8 кг

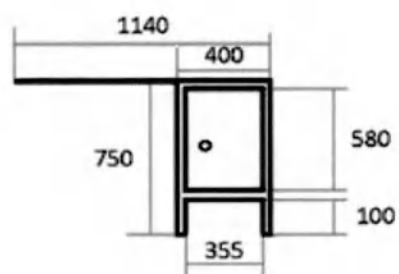


Умывальник:

10) УД16400400

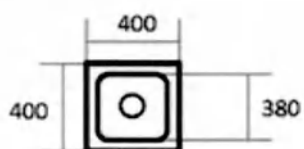


m=11,1 кг

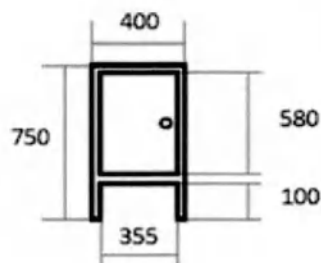


Шкафы настенные:

11) НШР800500300

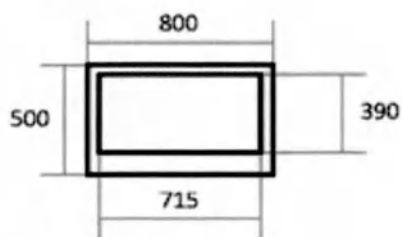


m=10 кг

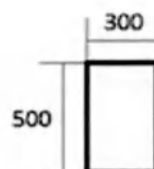


Кушетка-рундук:

12) КР1800600550

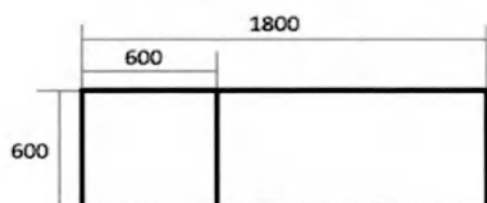

m=35,5 кг

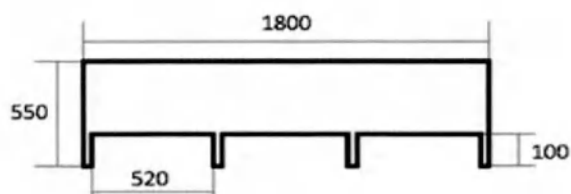

**Назначение медицинских изделий и специального оборудования,  
используемых в Комплексе**

**Кабинет «Гинекология»:**

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.
2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003 производства производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132) - 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха.
3. Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01, производства ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия (ФСР 2008/03499) – 1 шт. – предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций.
4. Кольпоскоп КС-01, КС-02 по ТУ 9442-001-52132018-2003, производства ООО "Здоровый Мир", Россия (РЗН 2013/733) – 1 шт.- дает возможность эффективно и своевременно диагностировать заболевания влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов.
5. Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013, производства ООО ПКФ "Современная импедансная медицинская техника", Россия (РЗН 2014/2264) – 1 шт. - Диагностика патологических и непатологических изменений тканей молочной железы.
6. Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП- "Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305) – 1 шт. - предназначен для оказания неотложной медицинской помощи на до-госпитальном этапе
7. Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/08890) – 1 шт. - предназначен для хранения медицинских принадлежностей в диагностическом кабинете.
8. Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150, производства ОАО «Тулиновский приборостроитель-

ный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) – 1 шт. - предназначены для взвешивания людей в диагностическом кабинете.

9. Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607) – 1 шт. - предназначен для измерения роста взрослых и детей.

10. Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003, производства ООО "НПП "Монитор", Россия (ФСР 2012/14015) – 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

11. Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСР 2012/12398) – 1 шт.- предназначены для исследования и распознавания мелких деталей.

12. Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009, производства ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07047) – 1 шт. - предназначен для проведения профилактических осмотров.

13. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. - предназначен для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий.

14. Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003, ФСР 2007/00787 от 01.10.2007, производства Можайский МИЗ, Россия (ФСР 2007/00787) – 1 шт. - предназначен для аускультации звуков, исходящих от сердца.

15. Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ, производства ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

16. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства Биохемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСР 2011/10072) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.

17. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов.

дов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов

18. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert, производство OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100) – 1 шт. – предназначен для измерения артериального давления

19. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 1 шт.- предназначены для для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

20. Приборы для измерения артериального давления и частоты пульса Модель: PRO-35, производство B.Well Swiss AG, Швейцария (РЗН 2016/4964) – 1 шт предназначен для измерения систолического и диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений.

21. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292)– 3 шт. – предназначены для сидения одного человека.

#### Кабинет «Диагностика»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.

2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003 производства производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132) - 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха.

3. Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ

2012/12398) – 1 шт.- предназначены для исследования и распознавания мелких деталей.

4. Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01, производства ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия (ФСР 2008/03499) – 1 шт. – предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций

5. Авторефрактометр RC-5000 с принадлежностями, производства «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726) – 1 шт. – предназначен для офтальмологических диагностических обследований.

6. Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭС, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607) – 1 шт. - предназначен для измерения роста взрослых и детей.

7. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства Биохемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.

8. Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305) – 1 шт. - предназначен для оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

9. Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928) – 1 шт. - предназначен для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет.

10. Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ, производства ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

11. Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/08890) – 1 шт. - предназначен для хранения медицинских принадлежностей в диагностическом кабинете.

12. Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1

до 15), производства "АйЭнДи Диагностик Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039) – 1 шт. - предназначен для определения в моче параметров веществ.

13. Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2008/01996) – 1 шт. - система ультразвуковой диагностики.

14. Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629) – 1 шт. - система ультразвуковой диагностики.

15. Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003, производства ООО "НПП "Монитор", Россия (ФСР 2012/14015) – 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

16. Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018, производства ООО "Нейрософт", Россия (ФСР 2009/05172) – 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

17. Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101, производства «Фукуда Дэнси Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4703) 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

18. Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222, производства ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379) 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

19. Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями, производства ООО "Альтомедика", Россия (РЗН 2013/809) 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

20. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017, производство Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513) – 1 шт. – предназначена для проведения дистанционных предрейсовых осмотров водителей.

21. Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I, производства "МИР С.р.л. - МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ", Италия (РЗН 2017/5323) – 1 шт. - Определение функций и исследование внешнего дыхания.

22. Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12207) – 1 шт. - прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника.
23. Стетоскоп Littmann с принадлежностями, производства «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207) – 1шт.- прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника.
24. Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-derma, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2009/03906) – 1 шт. - предназначен для диагностики поражений и изменений кожи посредством микроскопии в падающем свете.
25. Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: YX300, YX-301 производства "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461) – 1 шт. - предназначен для измерения частоты пульса и уровня насыщения крови кислородом.
26. Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) – 1 шт. - предназначены для взвешивания людей в диагностическом кабинете.
27. Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНД-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002, производства ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958) – 1 шт. - предназначены для взвешивания детей в кабинете.
28. Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: buck, C-128 Гц, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2010/08456) – 1 шт. - диагностика нервной и слуховой проводимости.
29. Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним, вариант исполнения gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ", Германия (ФСЗ 2009/03908) – 1 шт. – ручной оптический прибор, при помощи которого производится диагностика патологий уха, горла, носа.
30. Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005, производства ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07935) – 1 шт. - предназначено

для освещения отраженным светом уха, горла и носа во время проведения диагностических осмотров. - служит в качестве источника чистого безмасляного сжатого воздуха для дыхательного оборудования.

31. Носилки жесткие НЖ-ММ по ТУ 9451-003-10660186-00, производства ООО "НПП "Микромонтаж", Россия (ФСР 2010/07236) – 1шт. – используется для переноски пациентов.

32. Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008, производства ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509) – 1 шт. - предназначен для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

33. Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2007/00439) – 1 шт. предназначено для принудительной подачи кислорода в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.

34. Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928) – 1 шт. - предназначен для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет

35. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

36. Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС\*" (OPTIONIX\*) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020, производства ЗАО «НПО «МЕДКАР» (РЗН2020/10607) – 1 шт. - предназначен для определения остроты зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза.

37. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008, производства ООО Пневмоприбор, Россия (ФСР 2009/ 06204) – 1 шт. - предназначен для понижения давления кислорода с давления в кислородном баллоне до заданной величины.

38. Проектор знаков экранный офтальмологический ТСР, с принадлежностями, варианты исполнений: ТСР-3000 Р, производства Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2010/07992) – 1 шт. – предназначен для определения остроты зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза.

39. Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с при-

надлежностями, производства "Рексам Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2016/4151) – 1 шт. позволяет производить микроскопическую диагностику видимых частей глаза - век, склеры, конъюнктивы, радужки, хрусталика и роговицы.

40. Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00471) – 1 шт. - для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы.

41. Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102ТУ, производства АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997) – 1 шт. - предназначен для измерения внутриглазного давления.

42. Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU), производства OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония, (ФСЗ 2009/05422).- 1 шт.- предназначен для измерения температуры.

43. Набор для минитрахеостомии, производства "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" ФСЗ № 2009/05211– 1 шт. - предназначен для аспирации дыхательных путей.

44. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335) – 1 шт. – предназначена для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.

45. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов.

46. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС" 1шт. - Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реактивов.

47. Аппарат ультразвуковой серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (РЗН 2017/6115) – 1 шт. система ультразвуковой диагностики

48. Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/10093), 1-шт. предназначен для использования в качестве наружного дефибриллятора с питанием от аккумуляторной батареи

49. Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор", производства ООО "Медицинские компьютерные системы", Россия (ФСР 2007/00155, 1-шт. предназначен для измерения микроальтернаций ЭКГ.

50. Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014 Варианты исполнения: 3. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-01-«МЕДПЛАНТ», производства ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (РЗН 2015/2746) – 1 шт, предназначена для оказания скорой медицинской помощи.

51. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 1 шт.- предназначены для для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

52. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292)– 3 шт. – предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Лаборатория»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.

2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003 производства производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132) - 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха.

3. Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA, производства "Полимер Технологии Системс, Инк.", США (РЗН 2015/2693) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.
4. Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009, производства ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498) – 1 шт. - предназначен для экспресс-измерения концентрации глюкозы в крови.
5. Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США (РЗН 2016/3986) – 1 шт. – предназначен для измерения до 14 параметров мочи.
6. Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США (ФСЗ 2010/07756) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.
7. Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch®, вариант исполнения: EasyTouch® GCNhb, производство Биоптик Текнолоджи, Инк., Тайвань (ФСЗ 2011/10454) – 1 шт.
8. Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини), производства 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342) , 1-шт. предназначен для поределения уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови.
8. Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини), производства 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342), 1-шт, предназначен для анализа мочи.
9. Анализатор гемотологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями, производства : Вест Медика Продукционс- унд Хайдельс-ГмбХ, Австрия (РЗН 2017/5740) 1-шт. предназначен для проведения анализа крови.
10. Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями, производства «Диессе Диагностика Сенеze С.п.А.», Италия (РЗН 2019/9149) 1-шт. предназначен для определения скорости оседания эритроцитов.
11. Анализатор мочи DocUReader с принадлежностями , исполнения: DocUReader, производства 77 Электроника Кфт, Венгрия (ФСЗ 2012/13515) 1-шт. предназначен для проведения анализа мочи.
12. Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010, производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/10034) – 1 шт. - предназначен для размещения в нем пробирок.
13. Система для измерения уровня гемоглобина HemoControl с принадлежностями,

производства "ЕКФ-диагностик ГмбХ", Германия (ФСЗ 2008/02911) – 1шт. - предназначен для измерения характеристик крови.

14. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов

15. Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/08890) – 1 шт. - предназначен для хранения медицинских принадлежностей в диагностическом кабинете.

16. Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. - предназначен для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий.

17. Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания, производства «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай (ФСЗ 2010/06301) – 1 к-т. – взятие и хранение крови пациента

18. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов.

19. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 1 шт.- предназначены для для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

20. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вари-

антах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292) – 3 шт. – предназначены для сидения одного человека.

#### Кабинет «Вакцинация»

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.
2. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. - предназначены для обеззараживания воздуха.
3. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003 производства производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132) - 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха
4. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335) – 1 шт. – предназначена для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи
5. Дозаторы для дезинфицирующих средств и мыла, Модель UD-9000 бесконтактный дозатор, производства "Сарая Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2017/6270) – 1 шт.- предназначен для дезинфекции рук
6. Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU), производства OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05423) – 1шт. – предназначен для измерения температуры
7. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU), производства OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония ( РЗН

2015/3210 ) – 1 шт. – предназначен для измерения давления

8. Пульсоксиметр gi-fox, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00483) – 1 шт. – предназначен для измерения концентрации кислорода в крови

9. Шкафы медицинские ПАКС металл по ТУ 9452-002-96303248-2016. Варианты исполнения: V. Шкафы медицинские серии АМ: - Шкаф медицинский АМ-1, производства ООО "ПАКС-трейд", Россия (РЗН 2017/5700) – 1шт.- предназначен для хранения медицинских изделий

10. Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015. Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05, производства ООО Концерн "Аксион" Россия (РЗН 2017/5391) – 1шт. – предназначен для воздействия электротока на сердечную мышцу для синхронизации и восстановления ритма сокращений

11. Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008. Лоток почкообразный ЛМП - "МЕДИКОН", размерами в мм: 200 x 120 x 30, производства ООО "Научно-производственная фирма "МЕДИКОН", Россия (ФСР 2008/03233) – 1 шт. –предназначены для проведения различных медицинских манипуляций.

12. Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХМЕД, производства "Апексмед Интернэшнл Б. В.", Нидерланды (ФСЗ 2011/10188) – 1шт. предназначен для кислородной терапии с фиксированной и переменной концентрацией кислорода, доставки и увлажнения кислорода, а также распыления лекарственных препаратов.

13. Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Дезиптол". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-003-17156278-2013, производства ООО "Компания" НПХ", Россия, ЗАО НПО "Химсинтез", Россия (RU.77.99.88.002.E.001569.04.18) – 1 шт. предназначено для дезинфекции кожных покровов.

14. Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД (ВИЧ) по ТУ 9398-035-42965160-2007, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия (ФСР 2011/09914) – 1шт. - предназначена для индивидуальной профилактики и предотвращения заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-инфекциями.

15. Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ, производства АО "КАМПО", Россия (ФСР 2011/09914) – 1 шт. – предназначен для комплектования медицинских учреждений и транспортных средств скорой медицинской помощи в целях проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии

16. Морозильник биомедицинский глубокой заморозки модели DW-40 с принадлежностями вариант исполнения: DW-40L92, производства "Циндао Хайер Биомедикал Ко., Лтд.", Китай (ФСЗ 2012/13474) – 1шт. – предназначен для хранения вакцин.

17. Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. - предназначен для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий.

18. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов

19. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 3 шт.- предназначены для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

20. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292)– 3 шт. – предназначены для сидения одного человека.

21. Термоконтейнеры для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов с охлаждающими элементами по ТУ 9452-002-29927143-2014, вариант исполнения МТП-L9, производства ООО "МТП", Россия (РЗН 2015/3413) – 1 шт. – предназначен для охлаждения и поддержания температуры медицинских изделий

22. Изделия для фиксации ёмкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013, производства ООО "МЕДПЛАНТ" Россия (РЗН 2014/1603) – 1 шт. – предназначен для фиксации ёмкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами

23. Полотенца универсальные, производства ООО "Авангард", Россия - предназначены для поддержания чистоты и гигиены

24. Пленки одноразовые впитывающие "iD", размеры: 40х60; 60х60; 60х90, производства "Онтекс БВ", Россия (РЗН 2017/6287) - 1 шт. – предназначены для защиты покрытий от промокания и поддержания гигиены

25. Простыни и салфетки медицинские одноразовые из нетканого материала стерильные и нестерильные и комплекты из них по ТУ 9398-001-37492896-12, производства ООО "ПКФ "Медкомплект", Россия ( РЗН 2013/238) - 1 шт. - предназначены для поддержания чистоты и гигиены

26. Набор "Аптечка ПРОТИВОШОКОВАЯ (АнтиШок), производства ООО "ПАРЕНТКОМ", Россия – 1шт. - предназначена для оказания медицинской помощи

#### Кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.

2. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. - предназначен для обеззараживания воздуха.

3. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003 производства производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132) - 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха

4. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017, производства Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513) 1-шт.

5. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200, производства "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689), производства "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689) 1-шт.

6. Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU), производства OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05422) 1-шт.

7. Тесты NARCOSCREEN (тест-полоски, тест-кассеты) для выявления наркотических веществ в моче и слюне , производства "ИнТек Продактс, Инк.", КНР (ФСЗ 2010/08095) 1-

шт.

8. Стетоскоп Littmann с принадлежностями, производства «3М Компания, 3М Хеле Кеар», США 1-шт.

9. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) 1-шт.

10. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект". Россия (РЗН 2013/1089) не более 2-шт.

11. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert, производства OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100) не боле 2-шт.

12. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) не боле 3-шт.

13. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292) не более 3-шт.

#### Кабинет Передвижной пункт медицинского освидетельствования

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.

2. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. - предназначен для обеззараживания воздуха.

3.


Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003 производства производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/12132) - 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха

4. Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения busk, производства «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456) 1-шт.
5. Стетоскоп Littmann с принадлежностями, предназначена «3М Компания, 3М Хеле Кеар» США 1-шт.
6. Термометр электронный медицинский OMRON Flex Temp Smart (MC-343F-RU), производства OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/05422) не более 2-шт.
7. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M3 Expert, производства OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100) не более 2-шт.
8. Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов "АПИЛУЧ" СЦРГ.941439.002 ТУ, производства ООО "Битест", Россия (РЗН 2019/9481) 1-шт.
9. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) не более 2-шт.
10. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ» производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) не более 2-шт.
11. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) не более 3-шт.
12. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия РЗН 2013/1292) не более 3шт.

### Приложение 3


#### Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортных средств ПМК-48415, АЛ-59860С-2, ПМК-5756С0-2, 8724. В составе кабинетов «Диагностика», «Лаборатория», «Гинекология» (Рисунок 3-1, Рисунок 3-2)

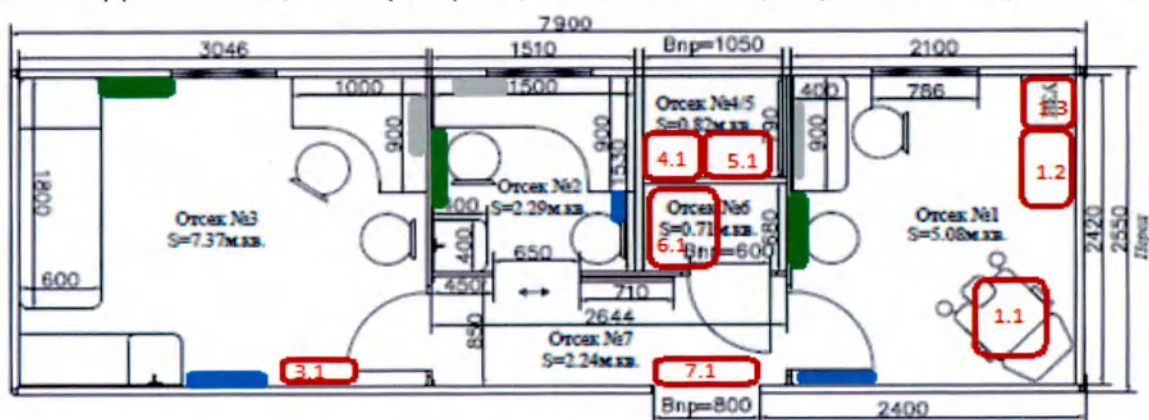

Планировка 1 Рисунок 3-1

- - обогреватели электрические конвекционные;
- - облучатели-рециркуляторы воздуха;
- - блок кондиционера;
- 1.1 - гинекологическое кресло;
- 1.2 - кольпоскоп;
- 1.3 - аппарат ультразвуковой диагностический;
- 2.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;
- 4.1 - электрогенераторная установка;
- 5.1 - блок кондиционера.
- 6.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.
- 7.1 - промышленная воздушная завеса;

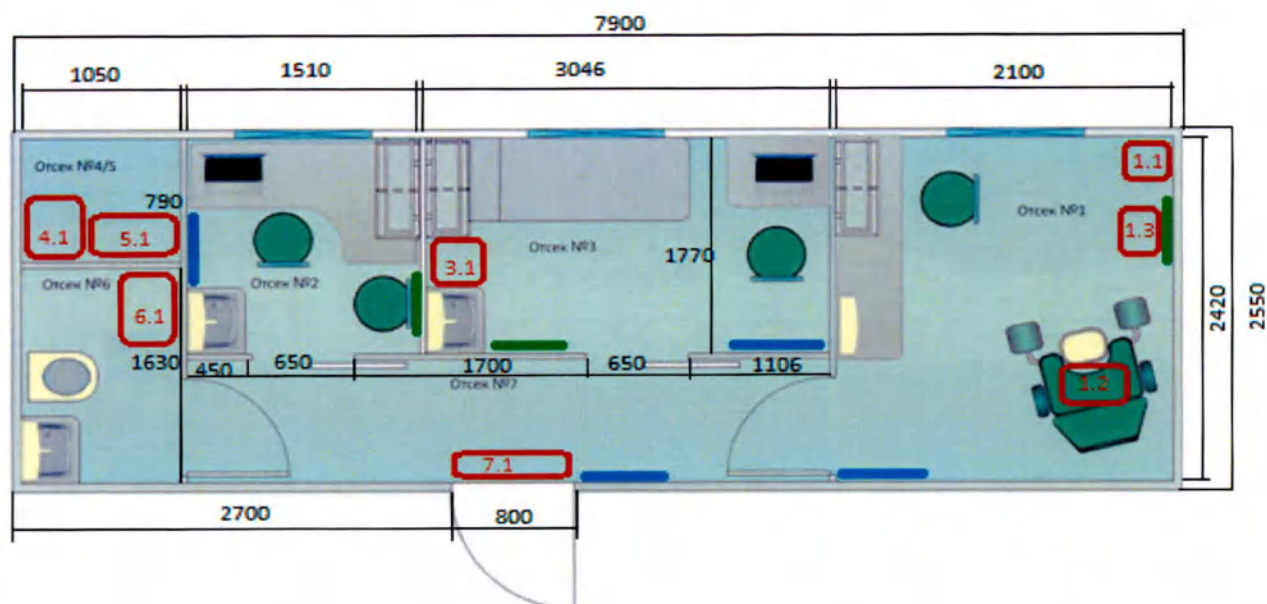

Планировка 2 Рисунок 3-2

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

1.2 - гинекологическое кресло;

1.3 - кольпоскоп

3.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;

4.1 - электрогенераторная установка;

5.1 - блок кондиционера.

6.1 - multifunctional autonomous energy converter.

7.1 - промышленная воздушная завеса;

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Гинекология» (Рисунок 3-3)

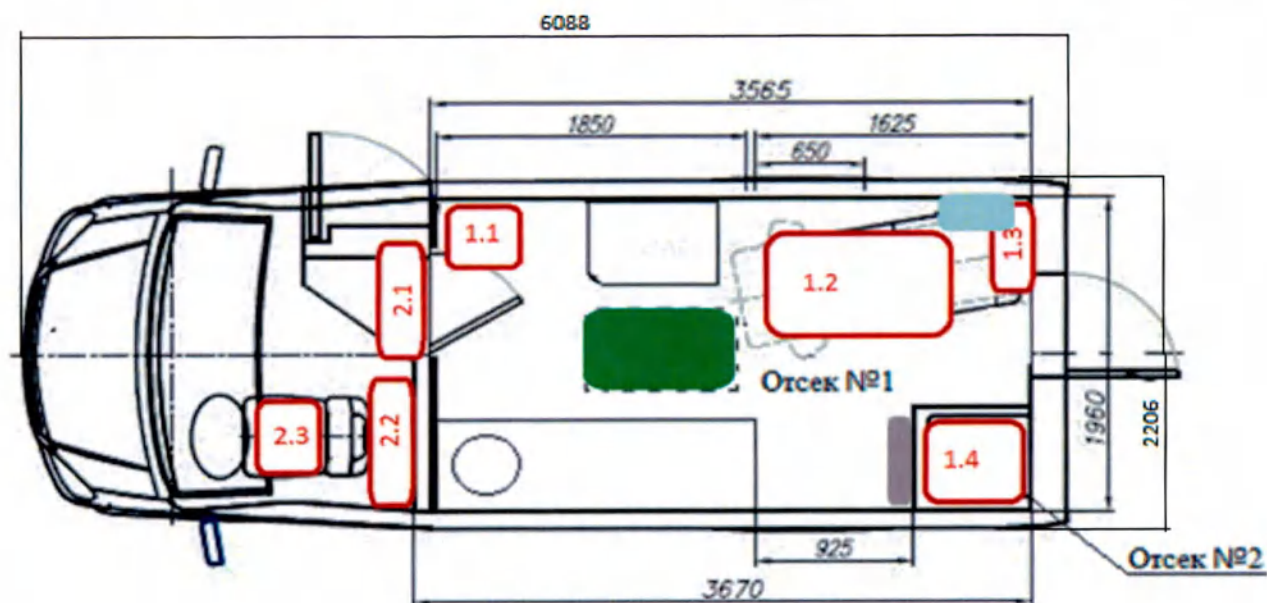


Рисунок 3-3

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - весы напольные;

1.2 - гинекологическое кресло;

1.3 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.4 - электрогенераторная установка;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

2.2 - воздушный отопитель;

2.3 - multifunctional autonomous energy converter.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортного средства 385427,385527. В составе кабинетов «Диагностика», «Гинекология»  
(Рисунок 3-4)

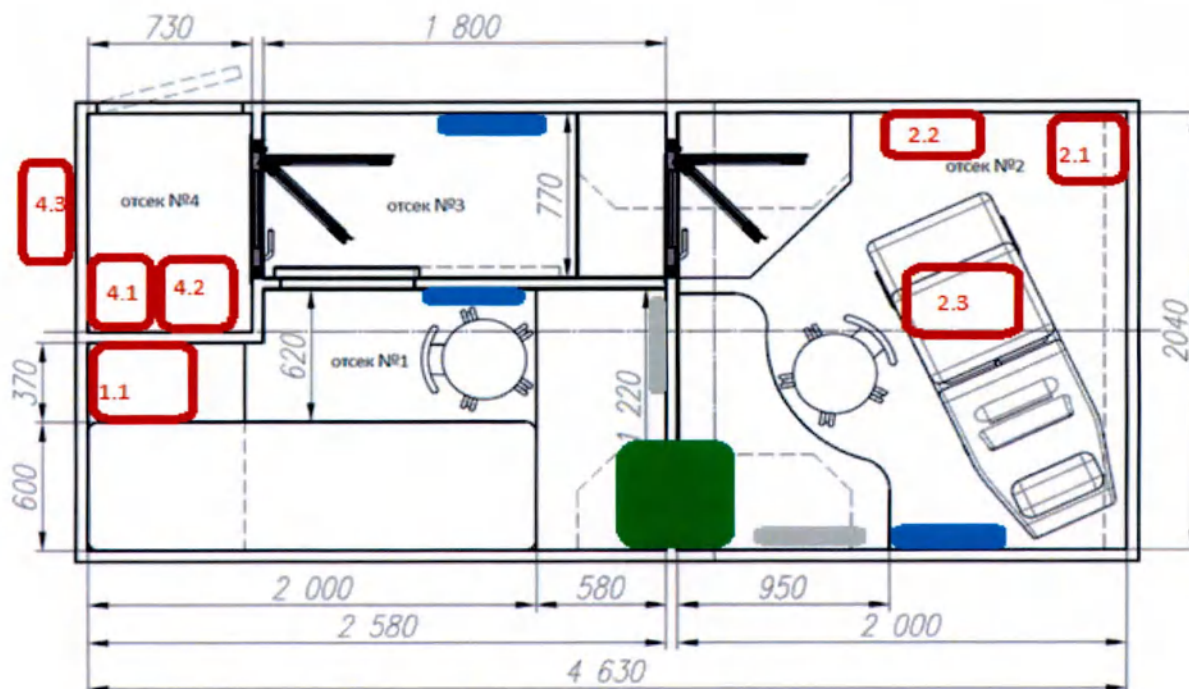


Рисунок 3-4

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - холодильник;

2.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

2.2 - весы напольные;

2.3 - гинекологическое кресло;

4.1 - электрогенераторная установка;

4.2 - multifunctional autonomous energy converter.

4.3 - внешний блок кондиционера

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе на базе транспортного средства 185514. В составе кабинетов «Вакцинация» (Рисунок 3-5)

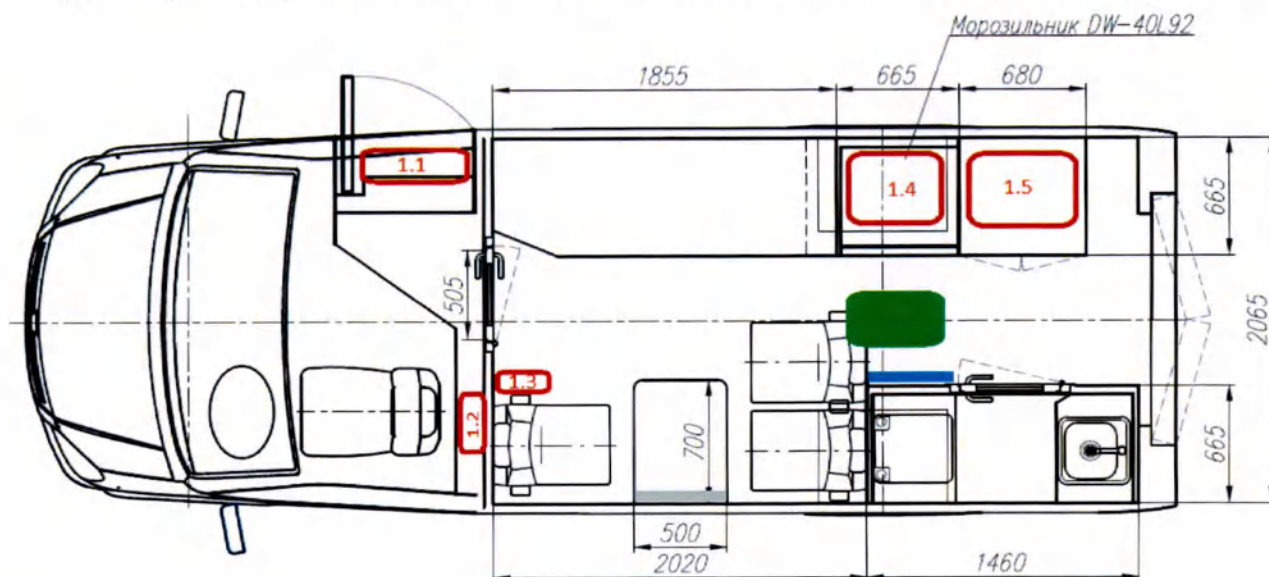


Рисунок 3-5

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 – воздушная завеса;


1.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

1.3 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.4 - морозильник;

1.5 - электрогенераторная установка.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Диагностика», «Пред-рейсовый и послерейсовый осмотр»

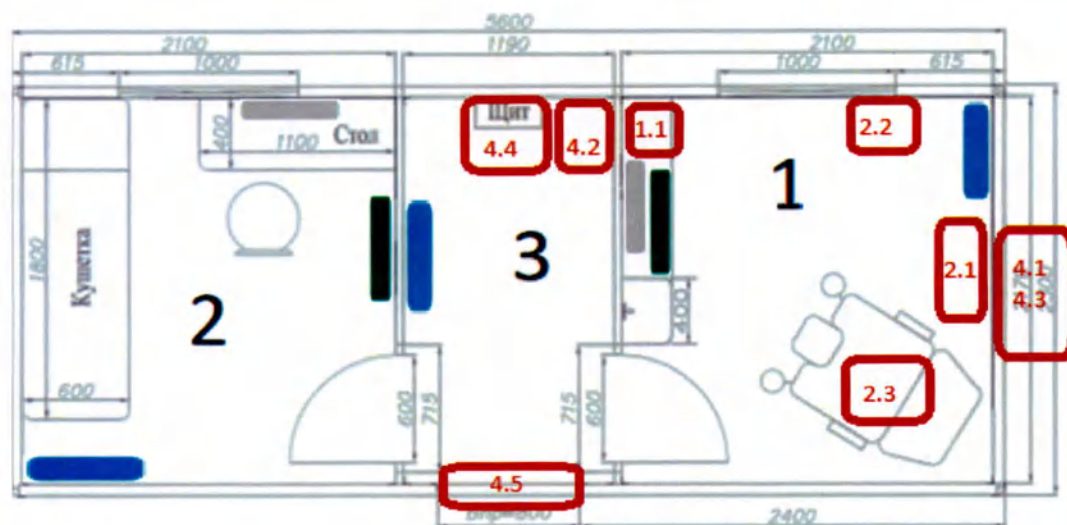

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 – автономный отопитель;

2.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

2.2 - весы напольные;

2.3 - гинекологическое кресло;

4.1 - электрогенераторная установка;


4.2 - multifunctional автономный преобразователь энергии.

4.3 – внешний блок кондиционера

4.4 – электрический щит

4.5 – тепловая завеса

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий Комплекса на базе транспортного средства 71497-0000010 В составе кабинетов «Передвижной пункт медицинского освидетельствования», кабинет «Вакцинация»

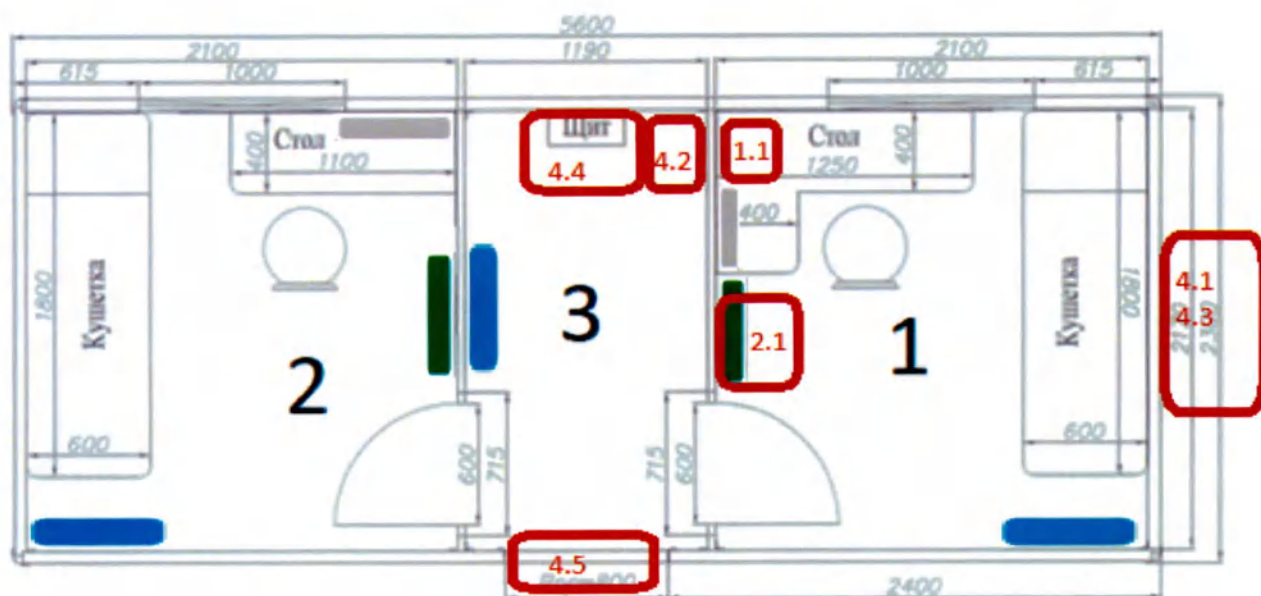

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 – автономный отопитель;

2.1 – медицинский морозильник;

4.1 - электрогенераторная установка;

4.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

4.3 – внешний блок кондиционера

4.4 – электрический щит

4.5. – Тепловая завеса

#### Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)

Будучи медицинским электрическим оборудованием, на которое распространяются особые меры защиты по электромагнитной совместимости (в соответствии со стандартом EN 60601-1- 2:2007), настоящие «Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)» служат дополнением к соответствующим инструкциям по эксплуатации/техническому описанию.

#### Безопасное обращение

Представленные далее общие инструкции по технике безопасности должны соблюдаться во время работы с медицинским электрическим оборудованием:

- Перед эксплуатацией, проверьте состояние и функционирование продукции.
- предоставляйте права на эксплуатацию продукции и приспособлений только прошедшим необходимое обучение и обладающим специальными знаниями и опытом сотрудникам.
- храните инструкции по эксплуатации и указания по электромагнитной совместимости (ЭМС) для персонала в рабочей зоне.
- если необходимо, во время настройки продукции предпримите особые меры защиты от электростатического разряда (ЭСР) и для радиочастотных устройств.
- не пользуйтесь мобильными или портативными устройствами, излучающими высокочастотную энергию (например, мобильные/сотовые/GSM телефоны) в непосредственной близости от продукции, т. к. эти устройства могут воздействовать на представленный продукт.
- регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет утечек тока и надежности заземления.

### Меры защиты от электростатического разряда (ЭСР)

Для электрических разъемов с маркировкой «ESD-sensitivity» примите следующие меры защиты:

- не прикасайтесь к выводам таких разъемов.
- все электрическое оборудование, которое необходимо подключить, подсоедините к линии равных потенциалов.
- используйте только те приспособления, которые рекомендованы для эксплуатации.
- проконтролируйте, чтобы весь персонал был проинформирован, либо прошел необходимое обучение касательно мер защиты для ЭСР.

### Указания и декларация соответствия

#### Указания и декларация производителя – Испытание на электромагнитную эмиссию

Оборудование предназначено для работы в электромагнитной обстановке, пояснение которой приведено ниже. Пользователю оборудования следует обеспечить ее применение в указанной обстановке.

| Испытание на электромагнитную эмиссию                        | Соответствие                          | Электромагнитная обстановка - указания                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиочастотные выбросы в соответствии с CISPR 11             | Соответствие группе 1                 | Оборудование использует радиочастотную энергию только для внутренних функций. Таким образом, величина выбросов очень низкая, и не способна повлиять на расположенное вблизи электронное оборудование.                           |
| Радиочастотные выбросы в соответствии с CISPR 11             | Соответствие классу Б                 | Оборудование пригодно для применения во всех местах, за исключением бытового назначения, и подключается непосредственно к общественной низковольтной сети электропитания, запитывающей здания, и используемой для бытовых нужд. |
| Гармонические выбросы в соответствии с IEC 61000-3-2         | Соответствие классу А (IEC 61000-3-2) |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Колебания напряжения и фликер в соответствии с IEC 61000-3-3 | Соответствие                          |                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Указания и декларация производителей – Испытание на помехоустойчивость

Оборудование предназначено для работы в электромагнитной обстановке, пояснение которой приведено ниже. Пользователю оборудования следует обеспечить ее применение в указанной обстановке.

| Испытание на помехоустойчивость                                               | Контрольный уровень IEC 60601                                                | Уровень соответствия | Электромагнитная обстановка - указания                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электростатический разряд (ЭСР) согласно стандарту IEC 61000-4-2              | $\pm 6$ кВ контакт<br>$\pm 8$ кВ воздух                                      | Соответствие         | Полы должны быть изготовлены из досок, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30 %. |
| Электростатический переходный процесс/выброс согласно стандарту IEC 61000-4-4 | $\pm 2$ кВ - для линий электропитания<br>$\pm 1$ кВ - для линий ввода-вывода | Соответствие         | Качество сети электропитания должно удовлетворять стандартной или медицинской обстановке.                                                                                   |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Броски согласно стандарту IEC 61000-4-5                                                                     | $\pm 1$ кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод"<br>$\pm 2$ кВ - при подаче помехи по схеме "провод-земля"                                                                                                                             | Соответствие | Качество сети электропитания должно удовлетворять стандартной или медицинской обстановке.                                                                                                                                                                          |
| Падения напряжения, перебои и изменения напряжения во входных линиях электропередач согласно IEC 61000-4-11 | $< 5\%$ (провал напряжения $> 95\%$ ) в течение 0,5 периода<br>$40\%$ (провал напряжения $60\%$ ) в течение пяти периодов<br>$70\%$ (провал напряжения $30\%$ ) в течение 25 периодов<br>$< 5\%$ (провал напряжения $> 95\%$ ) в течение 5 с | Соответствие | Качество сети электропитания должно удовлетворять стандартной или медицинской обстановке. Если пользователю оборудования необходим непрерывный режим работы во время перебоев в сети, рекомендуется подключать оборудование через источник бесперебойного питания. |
| Магнитное поле для частоты сети (50/60 Гц) согласно IEC 61000-4-8                                           | 3 А/м                                                                                                                                                                                                                                        | Соответствие | Магнитные поля должны лежать в пределах допустимых для стандартной или медицинской обстановки.                                                                                                                                                                     |

Примечание 1: Ут – напряжение сети переменного тока до проведения контрольного уровня.

#### Указания и декларация производителей – Защита от электромагнитных полей

Оборудование предназначено для работы в электромагнитной обстановке, пояснение которой приведено ниже. Пользователю оборудования следует обеспечить применение в указанной обстановке.

|                                           |                               |                      |                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Проверка защиты от электромагнитных полей | Контрольный уровень IEC 60601 | Уровень соответствия | Электромагнитная обстановка – указания <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                           |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                     |              | Портативные и мобильные радиочастотные устройства связи не должны находиться на расстоянии от какой-либо части оборудования, включая кабели, меньшем, чем рекомендуемый пространственный разнос, рассчитываемый по формуле для частоты передатчика.<br>Рекомендуемый пространственный разнос 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6 | 3 В (среднеквадратичное значение)   | Соответствие | $d = 1.2 \sqrt{P}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3                          | 3 В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц | Соответствие | $d = 1.2 \sqrt{P}$ для 80-800 МГц<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ для 800 МГц-2,5 ГГц<br>где $P$ – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно заявленным характеристикам производителя, а $d$ – рекомендуемый пространственный разнос в метрах (м).<br>Напряженности поля от стационарных радиочастотных передатчиков, согласно электромагнитному анализу места установки <sup>а</sup> , должны быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне <sup>б</sup> .<br>Помехи могут появиться вблизи оборудования с маркировкой  |

Примечание <sup>1</sup>: на частотах 80 и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

Примечание <sup>2</sup>: эти указания могут не применяться для всех случаев. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов, а также людей.

#### Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и оборудованием

Оборудование предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Пользователь оборудования может предупредить электромагнитные помехи за счет соблюдения минимального расстояния между портативными и мобильными радиочастотными устройствами связи (передатчиками)

и оборудованием, соблюдая рекомендации, указанные ниже и зависящие от максимальной выходной мощности такого оборудования.

| Номинальная максимальная мощность передатчика (Вт) | Расстояние разнеса <sup>1</sup><br>В зависимости от частоты передатчика (м) |                                  |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    | 150 кГц - 80 МГц<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$                                      | 80-800 МГц<br>$d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800 МГц - 2,5 ГГц<br>$d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0,01                                               | 0,12                                                                        | 0,12                             | 0,23                                    |
| 0,1                                                | 0,38                                                                        | 0,38                             | 0,73                                    |
| 1                                                  | 1,2                                                                         | 1,2                              | 2,3                                     |
| 10                                                 | 3,8                                                                         | 3,8                              | 7,3                                     |
| 100                                                | 12                                                                          | 12                               | 23                                      |

Расстояние разнеса в метрах (м) для передатчиков, максимальная мощность которых не представлена в этой таблице, можно определить по уравнению для частоты передатчика, где  $P$  – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно заявленным характеристикам производителя.

Примечание 1: на частотах 80 и 800 МГц используется расстояние разнеса для более высокого частотного диапазона.

Примечание 2: эти указания могут не применяться для всех случаев. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов, а также людей.

**Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала.**

Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала, должны изготавливаться из следующих материалов:

| Наименование материала                                            | НТД или марка материала                      | Изготовитель                                      | Применение                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Декоративный бумажно-слоистый пластик                             | Марка ДБСП ТГ 2/03/С                         | ООО «Лемарк», Россия                              | Отделочные материалы           |
| Алюминий                                                          | Марка АД31                                   | ООО «Альменс» Россия                              | Алюминиевый профиль            |
| Резина                                                            | Марка ПР-632                                 | ООО «Самекс» Россия                               | Уплотнение стыковых соединений |
| Кожа искусственная                                                | Марка ЕСО, состав: Тик 85, полиуретан СКУ 7Л | ООО «Чеховские мануфактуры», Россия               | Обшивка стульев                |
| Нержавеющая сталь                                                 | 06ХН28МДТ                                    | ЗАО «ВЗПС», Россия                                | Мойка                          |
| Алюминий                                                          | профиль алюминиевый марки 6060               | ООО «Красноярский Металлургический Завод», Россия | Алюминиевый уголок             |
| Композит, армированный стекловолокном Optiplan Polydet Perfomance | Покрытие «гелькоут», стекломат, UP-смола     | OPTIPLAN GmbH, Германия                           | Сэндвич панели                 |
| Коммерческий линолеум                                             | Марка ПВХ-С-7058 М                           | АО «ТАРКЕТТ», Россия                              | Напольное покрытие             |

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

137 (сто тридцать  
семь) листов

Генеральный директор  
подпись Горобец С.Л.

