

«УТВЕРЖДАЮ» («I AFFIRM»)

Кешав Бхупал, управляющий директор

(Keshav Bhupal, Managing Director)



Keshav Bhupal

20.05.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Презервативы из натурального латекса Duett™

Редакция №2. Дата документа: 24.04.2020




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

INDUS MEDICARE LIMITED

1-10-60/3, SURYODAYA, Begumpet, Hyderabad
Telangana, 500 016, India (Индия)

Тел.: +91 40 2776 2603, Факс: +91 40 2776 1418

e-mail: indusmedicare.hyd@gmail.com

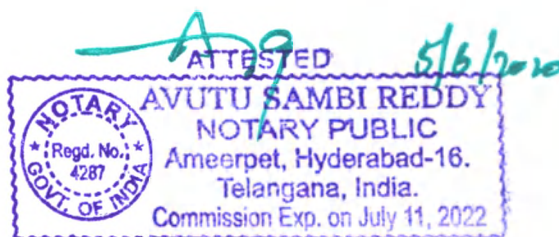

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ **Презервативы из натурального латекса Duett™**

Наименование изделия

Презервативы из натурального латекса Duett™ (далее - Презервативы Duett).

Назначение

Презервативы предназначены для предохранения от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).

Фармакологическая группа

Контрацептивы негормональные.

Описание применения по назначению

Презервативы, используемые потребителями, предназначены для удержания на половом члене во время совершения полового акта, для целей контрацепции и предотвращения инфекций, передающихся половым путем (ЗППП). Применение презервативов позволит избежать:

- а) Нежелательной беременности женщин,
- б) Получения инфекций, распространяемых путем полового контакта, или их передачи партнерам. В число этих инфекций входят герпес, хламидиоз, гонорея, ВИЧ и папилломы.

Презервативы из латекса уменьшают риск распространения болезней, передающихся половым путем, посредством ограждения от источника инфекции оболочкой презерватива.

Презервативы из латекса являются наиболее эффективным средством защиты от таких инфекций, как ВИЧ, гонорея, гепатит В, сифилис.

Презервативы из латекса являются менее эффективными против болезней, передающихся половым путем, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) и герпес.

Вышеупомянутые болезни, также могут передаваться при контакте с зараженным участком полового члена, не покрытого презервативом.

Если Вы считаете, что заразились болезнью, передаваемой половым путем, - свяжитесь с доктором. Для получения подробной информации о презервативах из латекса или болезнях, передаваемых половым путем, свяжитесь с доктором.

Описание

Презервативы Duett изготавливаются из натурального латекса, с гладкой поверхностью (классические) / текстурированные (ребристые, с точками) / тонкие / особо прочные / увеличенного размера, с накопителем для семенной жидкости, и в смазке.

Презервативы бесцветные, имеют номинальную ширину 53 и 58 мм.

Открытый конец презерватива должен быть закатан в венчик.

Презервативы из натурального латекса Duett™, в следующих вариантах исполнения:

1. Презервативы Duett «Classic» (с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, классические) – 3 шт/уп, 12шт/уп, 30шт/уп
2. Презервативы Duett «Extra strong» (с утолщенной стенкой, с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, особо прочные) – 3 шт/уп, 12шт/уп
3. Презервативы Duett «Dotted» (с точечным рифлением, с накопителем, с силиконовой смазкой) – 3 шт/уп, 12шт/уп
4. Презервативы Duett «Ribbed» (с ребристой структурой, с накопителем, с силиконовой смазкой) – 3 шт/уп, 12шт/уп, 30шт/уп
5. Презервативы Duett «Ultra light» (с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, особо тонкие) – 3 шт/уп, 12шт/уп, 30шт/уп
6. Презервативы Duett «XXL» (с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, увеличенного размера) – 3 шт/уп, 12шт/уп

7. Презервативы Duett «Mix» (упаковка из 3 типов: «Classic» (с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, классические), «Ultra light» (с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, особо тонкие), «Dotted» (с точечным рифлением, с накопителем, с силиконовой смазкой)) – 30шт (каждого типа по 10 шт)/уп

Упаковка

Презервативы упаковываются в фольгу толщиной 9 микрон из алюминия и полиламинатов (60х60 мм), предназначенную для защиты свойств и эксплуатационных качеств.

Вес презерватива в индивидуальной упаковке приведен в таблице ниже.

Тип упаковки	Презерватив в индивидуальной упаковке	
	±1мм	±0,2 г
Презервативы Duett «Classic»	60 x 60	3 x 2.78
Презервативы Duett «Dotted»	60 x 60	3 x 2.95
Презервативы Duett «Ribbed»	60 x 60	3 x 2.85
Презервативы Duett «Extra Strong»	60 x 60	3 x 3.74
Презервативы Duett «Ultra Light»	60 x 60	3 x 2.64
Презервативы Duett «XXL»	60 x 60	3 x 3.11
Презервативы Duett «Classic»	60 x 60	12 x 2.78
Презервативы Duett «Dotted»	60 x 60	12 x 2.95
Презервативы Duett «Ribbed»	60 x 60	12 x 2.85
Презервативы Duett «Extra Strong»	60 x 60	12 x 3.74
Презервативы Duett «Ultra Light»	60 x 60	12 x 2.64
Презервативы Duett «XXL»	60 x 60	12 x 3.11
Презервативы Duett «Classic»	60 x 60	30 x 2.78
Презервативы Duett «Mix» (Classic, Ultra Light, Dotted)	60 x 60	30 x 2.79
Презервативы Duett «Ribbed»	60 x 60	30 x 2.85
Презервативы Duett «Ultra Light»	60 x 60	30 x 2.64

Потребительская упаковка представляет собой коробку из дуплексного картона 300-350 г/м². Картонная упаковка, предназначенная для доставки товара потребителю, содержит 3, 12 или 30 индивидуальных упаковок презервативов из фольги.

Состав и форма выпуска

- Презервативы Duett «Classic», «Ribbed», «Ultra light»: в потребительской упаковке 3, 12 или 30 шт + вкладыш с инструкцией по применению (один на потребительскую упаковку).
- Презервативы Duett «Extra strong», «Dotted», «XXL»: в потребительской упаковке 3, 12 + вкладыш с инструкцией по применению (один на потребительскую упаковку).
- Презервативы Duett «Mix» (упаковка из 3 типов: Classic, Ultra light, Dotted): в потребительской упаковке 30шт (каждого типа по 10 шт. в упаковке) + вкладыш с инструкцией по применению (один на потребительскую упаковку).

Вид контакта с организмом человека

Кратковременный контакт со слизистыми оболочками и кожным покровом.

Материал изготовления

Презервативы Duett произведены из натурального латекса с силиконовой смазкой.

Область применения

Для индивидуального использования в области контрацепции и профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

Кратность применения

Презервативы являются нестерильными медицинскими изделиями, предназначенными для однократного применения.

Презервативы из латекса уменьшают риск распространения болезней, передающихся половым путем, посредством ограждения от источника инфекции оболочкой презерватива.

Презервативы из латекса являются наиболее эффективным средством защиты от таких инфекций, как ВИЧ, гонорея, гепатит В, сифилис.

Презервативы из латекса являются менее эффективными против болезней, передающихся половым путем, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) и герпес.

Вышеупомянутые болезни, также могут передаваться при контакте с зараженным участком полового члена, не покрытого презервативом.

Если Вы считаете, что заразились болезнью, передаваемой половым путем, - свяжитесь с доктором. Для получения подробной информации о презервативах из латекса или болезнях, передаваемых половым путем, свяжитесь с доктором.

Консультация

Если у Вас возникли вопросы по противозачаточным средствам с целью предотвращения нежелательной беременности или в связи с состоянием здоровья, - проконсультируйтесь с врачом.

Показания к применению

Защита от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые соображения

Ввиду того, что презервативы изготавливаются из натурального латекса, есть вероятность аллергических реакций у некоторых людей. Презервативы, изготавливаемые компанией Indus Medicare Limited, подвергаются выщелачиванию с целью удаления/ сокращения всех поддающихся выщелачиванию непрореагировавших реагентов и содержания белков с целью сокращения риска аллергических реакций у пользователя. Происходит постоянное восполнение уровня раствора щелочи, мониторинг его концентрации и полная замена (периодически), с целью получения презервативов хорошего качества.

ВНИМАНИЕ!

Несмотря на то, что ни один из видов контрацепции не может обеспечить 100% эффективность, презервативы из латекса, при правильном использовании являются очень эффективным методом предотвращения беременности, не вызывая серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при использовании других противозачаточных средств.

Презервативы главным образом предназначены для использования при вагинальном половом акте. При другом виде использования повышается риск повреждения презерватива. Презервативы из латекса, при правильном использовании, уменьшают риск распространения ВИЧ-инфекции (СПИД) и других болезней, передающихся половым путем.

Предостережения

- Не используйте презерватив повторно. При повторном использовании презерватива возможен повышенный риск разрыва или попадания инфекции.
- Храните презервативы в прохладном, сухом месте [Не выше 25С°], избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Если оболочка презерватива стала липкой, непрочной или поврежденной, не используйте презерватив. Необходимо использование нового презерватива из неповрежденной упаковки.
- При обнаружении утечки или разрыва презерватива при использовании, требуется обращение к доктору (не позже 72 часов)
- Если цвет презерватива изменился, не используйте презерватив.

Побочные действия

Данный продукт содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызывать аллергические реакции.

Основные параметры презервативов

На поверхности презерватива не должно быть трещин, отверстий, пузырей, посторонних включений, коагулюмов, подтеков и наплывов, превышающих допуск по толщине. Венчик должен быть без надрывов и ущемлений.

Презервативы должны быть герметичными.

Основные параметры презервативов Duett, в зависимости от варианта исполнения, представлены в таблице ниже.

Вариант исполнения	Описание продукта	Размер, мм					Масса смазки, мг ²	Вес, г
		длина ¹	ширина	толщина стенки	толщина венчика	длина накопителя		
Презервативы Duett «Classic»	С накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, классические	≥180	53±2	0.070±0.010	1.3-1.6	21±2	мин.350	1.45-1.85
Презервативы Duett «Dotted»	С точечным рифлением, с накопителем, с силиконовой смазкой	≥180	53±2	0.070±0.010	1.4-1.7	21±2	мин.350	1.60-1.90
Презервативы Duett «Ribbed»	С ребристой структурой, с накопителем, с силиконовой смазкой	≥180	53±2	0.070±0.010	1.4-1.7	21±2	мин.350	1.60-2.0
Презервативы Duett «Ultra light»	С накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, особо тонкие	≥180	53±2	0.060±0.010	1.2-1.5	21±2	мин.350	1.35-1.55
Презервативы Duett «Extra strong»	С утолщенной стенкой, с накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, особо прочные	≥180	53±2	0.100±0.020	1.5-2.0	21±2	мин.350	1.8-2.90
Презервативы Duett «XXL»	С накопителем, гладкие, с силиконовой смазкой, увеличенного размера	≥190	58±2	0.070±0.010	1.3-1.6	27±2	мин.350	1.90-2.30

¹ Значение максимальной длины для презерватива длиной 180 мм не может превышать 200 мм, для презерватива длиной 190 мм не может превышать 205 мм.

² Максимальное значение массы смазки не должно превышать 550 мг


Разрывной объем и давление

Минимальные значения разрывного давления и объема для конкретных презервативов составляет:


- Разрывной объем = мин. 18,0 л (для презервативов Duett «Classic», «Extra strong», «Dotted», «Ribbed», «Ultra light»)
- Разрывной объем = мин. 22,0 л (только для презервативов Duett «XXL»).
- Разрывное давление = мин. 1,0 кПа (для всех вариантов исполнения презервативов Duett).

Схематическое изображение презервативов Duett:


- Презервативы Duett «Classic»

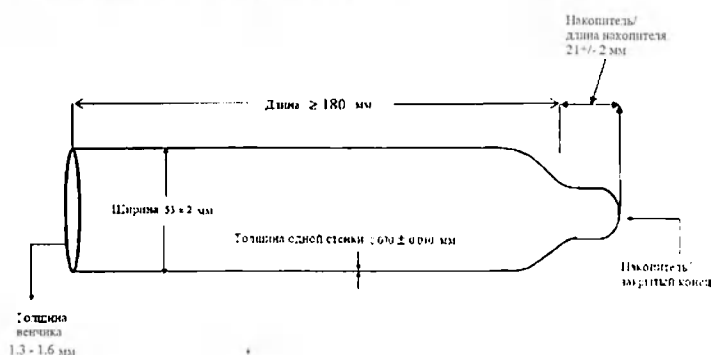


- Презервативы Duett «Extra Strong»

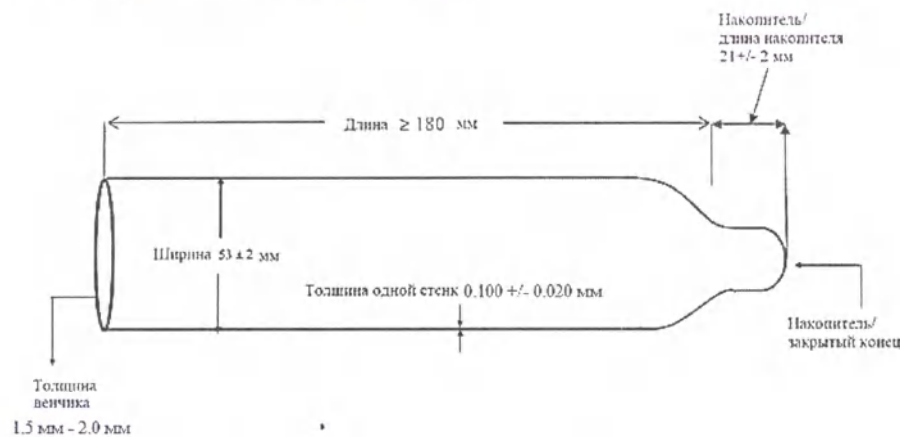


- Презервативы Duett «Dotted»

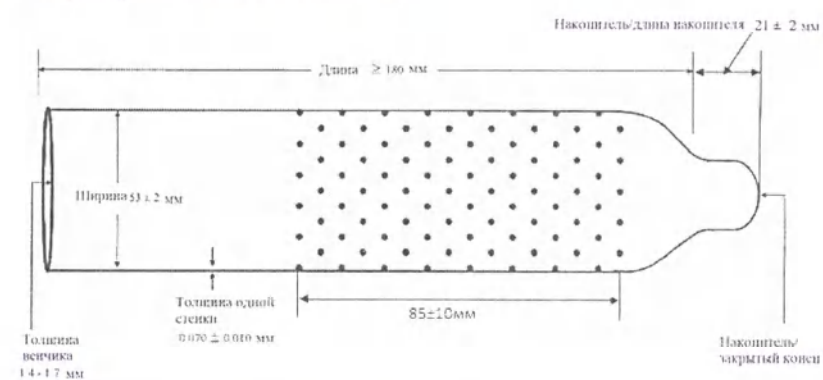


- Презервативы Duett «Ultra Light»

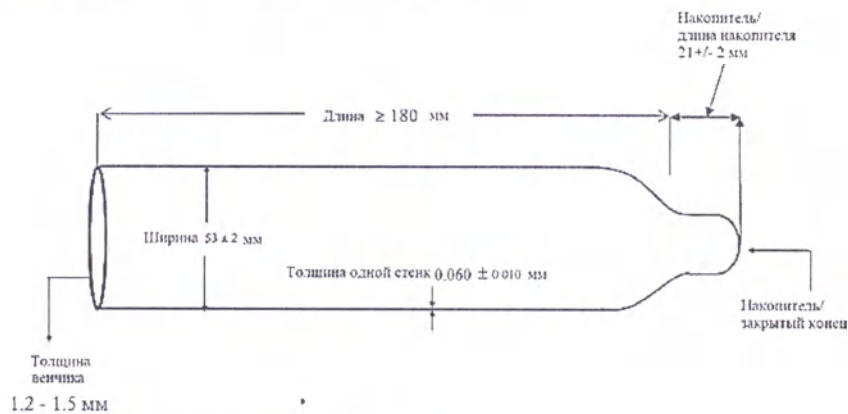

- Презервативы Duett «Ribbed»

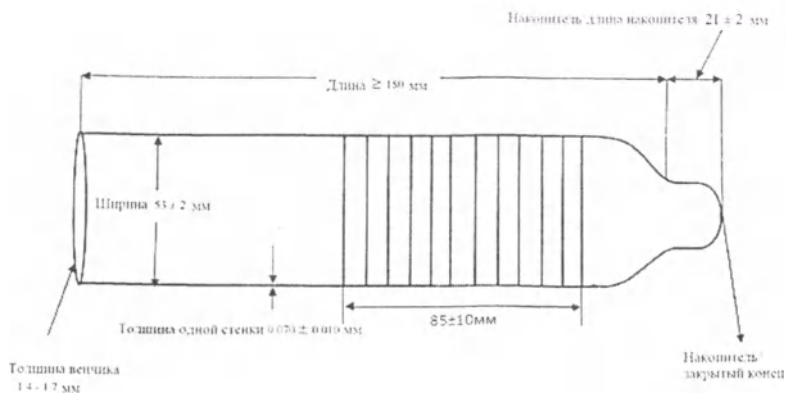

• Презервативы Duett «XXL»

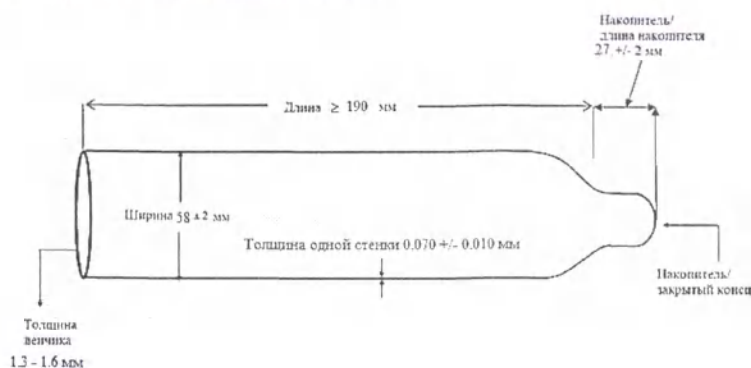

Инструкция по применению

При правильном использовании презервативы защищают от ВИЧ/СПИДА и других заболеваний, передающихся половым путем. Хранить в сухом, прохладном месте. Презерватив необходимо распаковывать аккуратно.



1. Аккуратно распакуйте презерватив, не повредите его пальцами, украшениями и т.п.



2. Чтобы вы могли правильно надеть презерватив, половой член должен находиться в возбужденном состоянии. Презерватив необходимо надеть до начала полового контакта с партнером, чтобы обеспечить защиту от заболеваний, передающихся половым путем, а также предупредить нежелательную беременность. Поместите кольцо презерватива на головку возбужденного полового члена и в то же время большим и указательным пальцем одной руки надавите на кончик презерватива, чтобы выпустить находящийся внутри воздух.



3. Другой рукой аккуратно разверните презерватив по всей длине полового члена.

4. Необходимо остановиться и проверить, если почувствуете соскальзывание презерватива или чрезмерное сжатие полового члена, т.к. это может привести к разрыву презерватива;



5. Снимите презерватив сразу после эякуляции и до того, как член обмякнет, плотно придерживая презерватив у его основания. После использования утилизируйте презерватив, завернув его в бумажную салфетку и выбросив в мусорный контейнер. Не выбрасывайте презерватив в унитаз.

6. Никогда не используйте презерватив более одного раза. Используйте презерватив во время каждого полового акта. НЕ используйте презерватив повторно. Повторное использование презерватива может повредить изделие, что, в свою очередь, может привести к беременностям и болезням.

ВНИМАНИЕ

- Если необходима дополнительная смазка, то используйте смазку, рекомендованную для презервативов, а не смазку на масляной основе (например, вазелин, детское масло, лосьоны для тела, массажные масла, сливочное масло, маргарин и т.п.), потому что смазка на масляной основе негативно влияет на целостность презерватива.
- Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом на предмет переносимости медикаментов, которые могут контактировать с презервативом.
- Презерватив изготовлен из натурального латекса, который может привести к аллергическим реакциям, таким как анафилактический шок, если у пользователя аллергия на латекс.
- Если у вас есть сомнения в действенности вашего метода контрацепции, в том числе вследствие разрыва презерватива, или если вы имели незащищенный половой контакт, немедленно обратитесь к врачу. В случае разрыва презерватива при использовании или обнаружении в нем отверстия рекомендуем обратиться за медицинской помощью как можно скорее, но не позже чем через 72 часа после случившегося.

Соответствие стандартам РФ

Презервативы соответствуют техническим требованиям следующих стандартов:

1. ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»
2. ГОСТ 4645-81 Презервативы резиновые. Технические условия (п.2.2., п.2.3., п.2.4 (кроме презервативов с точечным рифлением и ребристой структурой), п.2.5., п.2.7., п.2.8., п.5.1.-п.5.4., п.5.6.-п.5.8, п.5.10.-п.5.13)
3. ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования». Общие технические условия
4. ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»
5. ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»
6. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»
7. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»

Условия эксплуатации

В период эксплуатации презерватив находится в организме человека. Температура эксплуатации от +32 до +42°C.

Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки (в зависимости от варианта исполнения) должна содержать:

- обозначение торговой марки
- обозначение варианта исполнения презерватива
- номер партии (LOT),
- дату изготовления (MFD: год-месяц),
- срок годности до (EXP: год-месяц),
- наименование производителя.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

- наименование варианта исполнения презерватива,
- обозначение торговой марки,
- наименование производителя, с указанием адреса местонахождения,
- место производства,
- уполномоченная организация/Импортер в России,
- организация, принимающая претензии потребителей по вопросам качества,
- условия хранения,
- годен до (месяц и год),
- номер партии (LOT),
- номинальное количество (шт),
- номинальные размеры (длина, ширина, толщина), в мм,
- штрих-код,
- описание презерватива с указанием количества презервативов в упаковке, структуры поверхности презерватива, наличия накопителя, наличия силиконовой смазки,
- рекламный материал: Смазка не разрушает сперматозоиды. Презервативы при правильном использовании – эффективное средство для предохранения от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). Презервативы Duetт произведены из натурального латекса. Проверено электроникой. Никакое из средств контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности или ЗПП,
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»,
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»,
- символ «Беречь от влаги»,
- символ «Температурный диапазон хранения»,
- символ «Выбросить в урну»,
- символ «Запрет на повторное применение»,
- знак соответствия (знак РСТ, знак ЕС),
- номер регистрационного удостоверения (Регистрационное удостоверение № ____ . Дата ____),
- официальный сайт уполномоченной организации;
- не использовать при повреждении упаковки.

Расшифровка символов и надписей на маркировке:

LOT	Номер партии		Беречь от влаги
	Обратитесь к инструкции по применению		Температурный диапазон хранения
	Запрет на повторное применение		Не допускать воздействия солнечного света
	Выбросить в урну	CE	Знак CE
MFD	Дата изготовления		Знак РСТ (при декларировании)
EXP	Срок годности до		Не использовать при повреждении упаковки

Условия хранения и транспортирования

Презервативы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

Презервативы должны транспортироваться при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С (относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 °С).

При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течение 1 сут. с момента получения при нормальных климатических условиях.

Презервативы следует хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25°С вдали от прямых солнечных лучей.

Утилизация

Утилизация презерватива, если индивидуальная упаковка содержит явные повреждения, использованного презерватива, производится совместно с бытовыми отходами. Особых требований к утилизации нет. Не допускается слив использованных изделий в канализацию.

Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие презервативов техническим требованиям, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения презервативов – 5 лет со дня изготовления.

Производитель

INDUS MEDICARE LIMITED

1-10-60/3, SURYODAYA, Begumpet, Hyderabad Telangana,

500 016, India (Индия)

Адрес места производства: NH - 7 Ramaipally (Village) Toopran (Mandal), Medak (District)

502 336 Telangana, India (Индия).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАСА» (ООО «АЛМАСА»)

660010, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 50, корп. 2

Тел: (391) 276-81-35. Факс: (391) 276-81-35

E-mail: almasaltd@bk.ru

«УТВЕРЖДАЮ» («I AFFIRM»)

Кешав Бхупал, управляющий директор

(Keshav Bhupal, Managing Director)



Keshav Bhupal

20.05.2020

Круглая печать: Indus Medicare Ltd.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Презервативы из натурального латекса Duett™

Редакция №2. Дата документа: 24.04.2020



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:



INDUS MEDICARE LIMITED

1-10-60/3, SURYODAYA, Begumpet, Hyderabad

Telangana, 500 016, India (Индия)

Тел.: + 91 40 2776 2603, Факс: + 91 40 2776 1418

e-mail: indusmedicare.hyd@gmail.com

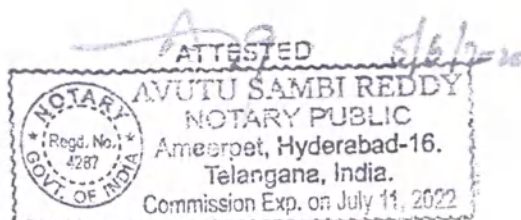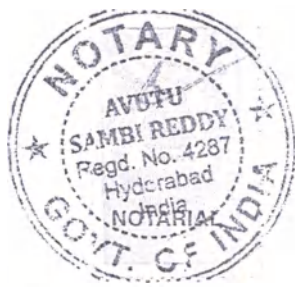

Круглая печать: Нотариус, правительство Индии, Авуту Самби Редди, рег.номер 4287, Хайдерабад, Индия.

Штамп: ЗАВЕРЕНО АВУТУ САМБИ РЕДДИ, НОТАРИУС, Амеерпет, Хайдерабад-16. Телангана, Индия. Срок действия истекает 11 июля 2022.

Нотариус, правительство Индии. рег.номер 4287.

*Перевод с английского языка на русский язык верен.
Переводчик: Ушакова Юлия Викторовна*

Российская Федерация
город Красноярск, Красноярский край
Двадцать третьего июня две тысячи двадцатого года

Я, Трихина Екатерина Николаевна, нотариус Красноярского нотариального округа, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ипатовой Юлии Викторовны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 24/157-н/24-2020-3-641

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 500 руб.



Е. Н. Трихина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью нотариуса, Трихиной
Екатерины Николаевны, Красноярский
нотариальный округ

11 (одиннадцать) листов

Нотариус



«УТВЕРЖДАЮ» («I AFFIRM»)

Кешав Бхупал, управляющий директор

(Keshav Bhupal, Managing Director)



Keshav Bhupal

20.05.2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ВКЛАДЫШ) Презервативы из натурального латекса Duett™

Редакция №2. Дата документа: 24.04.2020




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

INDUS MEDICARE LIMITED

1-10-60/3, SURYODAYA, Begumpet, Hyderabad
Telangana, 500 016, India (Индия)

Тел.: + 91 40 2776 2603, Факс: + 91 40 2776 1418

e-mail: indusmedicare.hyd@gmail.com

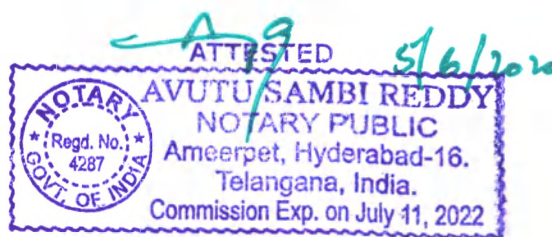



Высокая степень защиты от болезней, передающихся половым путем.

Презервативы из латекса уменьшают риск распространения болезней, передающихся половым путем, посредством ограждения от источника инфекции оболочкой презерватива. Презервативы из латекса являются наиболее эффективным средством защиты от таких инфекций, как ВИЧ, гонорея, гепатит В, сифилис. Презервативы из латекса являются менее эффективными против болезней, передающихся половым путем, таких как вирус папилломы человека [ВПЧ] и герпес.

Вышеупомянутые болезни, также могут передаваться при контакте с зараженным участком полового члена, не покрытого презервативом. Если вы считаете, что заразились болезнью, передаваемой половым путем, — свяжитесь с доктором. Для получения подробной информации о презервативах из латекса или болезнях, передаваемых половым путем, свяжитесь с доктором.

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием

ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что ни один из видов контрацепции не может обеспечить 100% эффективность, презервативы из латекса, при правильном использовании являются очень эффективным методом предотвращения беременности, не вызывая серьезных побочных эффектов, которые могут возникнуть при использовании других противозачаточных средств. Презервативы главным образом предназначены для использования при вагинальном половом акте. При другом виде использования повышается риск повреждения презерватива. Презервативы из латекса, при правильном использовании, уменьшают риск распространения ВИЧ инфекций [СПИД] и других болезней, передающихся половым путем.

Презервативы из латекса предназначены для предохранения от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем [ВИЧ, гонорея, сифилис, гепатит В и др.]. Если у Вас возникли вопросы по противозачаточным средствам с целью предотвращения нежелательной беременности или в связи с состоянием здоровья, — проконсультируйтесь с врачом.

Процесс производства и контроль качества основывается на базе обширной производственной практики [GMP].

Презервативы Duett соответствуют самым высоким международным стандартам, таким как ISO 4074:2015, ISO 13485:2016.

Каждый презерватив проходит 100% электронную проверку.

Все виды презервативов Duett имеют срок хранения 5 лет.

Уполномоченная организация/Импортер в России: ООО «АЛМАСА», 660010, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 50, корп. 2

Презервативы Duett соответствуют требованиям ГОСТ 4645-81 (п.2.2., п.2.3., п.2.4 (кроме презервативов с точечным рифлением и ребристой структурой), п.2.5., п.2.7., п.2.8., п.5.1.-п.5.4., п.5.6.-п.5.8, п.5.10.-п.5.13); ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

ВНИМАНИЕ

Данный продукт содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызвать аллергические реакции.

Применение презервативов противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном использовании презервативы защищают от ВИЧ/СПИДА и других заболеваний, передающихся половым путем. Хранить в сухом, прохладном месте. Презерватив необходимо распаковывать аккуратно.



Аккуратно распакуйте презерватив, не повредите его пальцами, украшениями и т.п.



Чтобы правильно надеть презерватив, половой член должен находиться в возбужденном состоянии. Презерватив необходимо надеть до начала полового контакта с партнером, чтобы обеспечить защиту от заболеваний, передающихся половым путем, а также предупредить нежелательную беременность. Поместите кольцо презерватива на головку возбужденного полового члена и в то же время большим и указательным пальцем одной руки надавите на кончик презерватива, чтобы выпустить находящийся внутри воздух.



Другой рукой аккуратно разверните презерватив по всей длине полового члена. Необходимо остановиться и проверить, если почувствуете соскальзывание презерватива или чрезмерное сжатие полового члена, т.к. это может привести к разрыву презерватива



Снимите презерватив сразу после эякуляции и до того, как член обмякнет, плотно придерживая презерватив у его основания. После использования утилизируйте презерватив, завернув его в бумажную салфетку и выбросив в мусорный контейнер. Не выбрасывайте презерватив в унитаз.

Никогда не используйте презерватив более одного раза. Используйте презерватив во время каждого полового акта. НЕ используйте презерватив повторно. Повторное использование презерватива может повредить изделие, что, в свою очередь, может привести к беременностям и болезням.

ВНИМАНИЕ

- Если необходима дополнительная смазка, то используйте смазку, рекомендованную для презервативов, а не смазку на масляной основе (например, вазелин, детское масло, лосьоны для тела, массажные масла, сливочное масло, маргарин и т.п.), потому что смазка на масляной основе негативно влияет на целостность презерватива.
- Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом на предмет переносимости медикаментов, которые могут контактировать с презервативом.
- Презерватив изготовлен из натурального латекса, который может привести к аллергическим реакциям, таким как анафилактический шок, если у пользователя аллергия на латекс.
- Если у вас есть сомнения в действенности вашего метода контрацепции, в том числе вследствие разрыва презерватива, или если вы имели незащищенный половой контакт, немедленно обратитесь к врачу. В случае разрыва презерватива при использовании или обнаружении в нем отверстия рекомендуем обратиться за медицинской помощью как можно скорее, но не позже чем через 72 часа после случившегося.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не используйте презерватив повторно. При повторном использовании презерватива возможен повышенный риск разрыва или попадания инфекции.
- Храните презервативы в прохладном, сухом месте [Не выше 25°C], избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Если оболочка презерватива стала липкой, непрочной или поврежденной, не используйте презерватив. Необходимо использование нового презерватива из неповрежденной упаковки.
- при обнаружении утечки или разрыва презерватива при использовании, требуется обращение к доктору (не позже 72 часов)
- Если цвет презерватива изменился, не используйте презерватив.

«УТВЕРЖДАЮ» («I AFFIRM»)

Кешав Бхупал, управляющий директор

(Keshav Bhupal, Managing Director)



Keshav Bhupal

20.05.2020

Круглая печать: Indus Medicare Ltd.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ВКЛАДЫШ) Презервативы из натурального латекса DuetTM

Редакция №2. Дата документа: 24.04.2020




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

INDUS MEDICARE LIMITED

1-10-60/3, SURYODAYA, Begumpet, Hyderabad
Telangana, 500 016, India (Индия)

Тел.: + 91 40 2776 2603, Факс: + 91 40 2776 1418

e-mail: indusmedicare.hyd@gmail.com

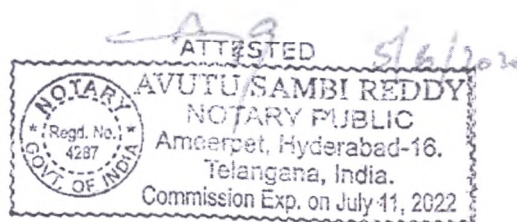

Круглая печать: Нотариус, правительство Индии, Авуту Самби Редди, рег.номер 4287, Хайдерабад, Индия.

Штамп: ЗАВЕРЕНО АВУТУ САМБИ РЕДДИ, НОТАРИУС, Амеерпет, Хайдерабад-16. Телангана, Индия. Срок действия истекает 11 июля 2022.

Нотариус, правительство Индии. рег.номер 4287.

*Перевод с английского языка на русский язык верен.
Переводчик: Игнатова Юлия Викторовна*

Российская Федерация
город Красноярск, Красноярский край
Двадцать третьего июня две тысячи двадцатого года

Я, Трихина Екатерина Николаевна, нотариус Красноярского нотариального округа, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ипатовой Юлии Викторовны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 24/157-н/24-2020-3-640

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 500 руб.



Е. Н. Трихина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью нотариуса, Трихиной
Екатерины Николаевны, Красноярский
нотариальный округ

04 (четыре) листа

Нотариус

