


ООО «Крейт»

Фотографии изделия

СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ И
ВКЛАДНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
СТОПЫ


по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024

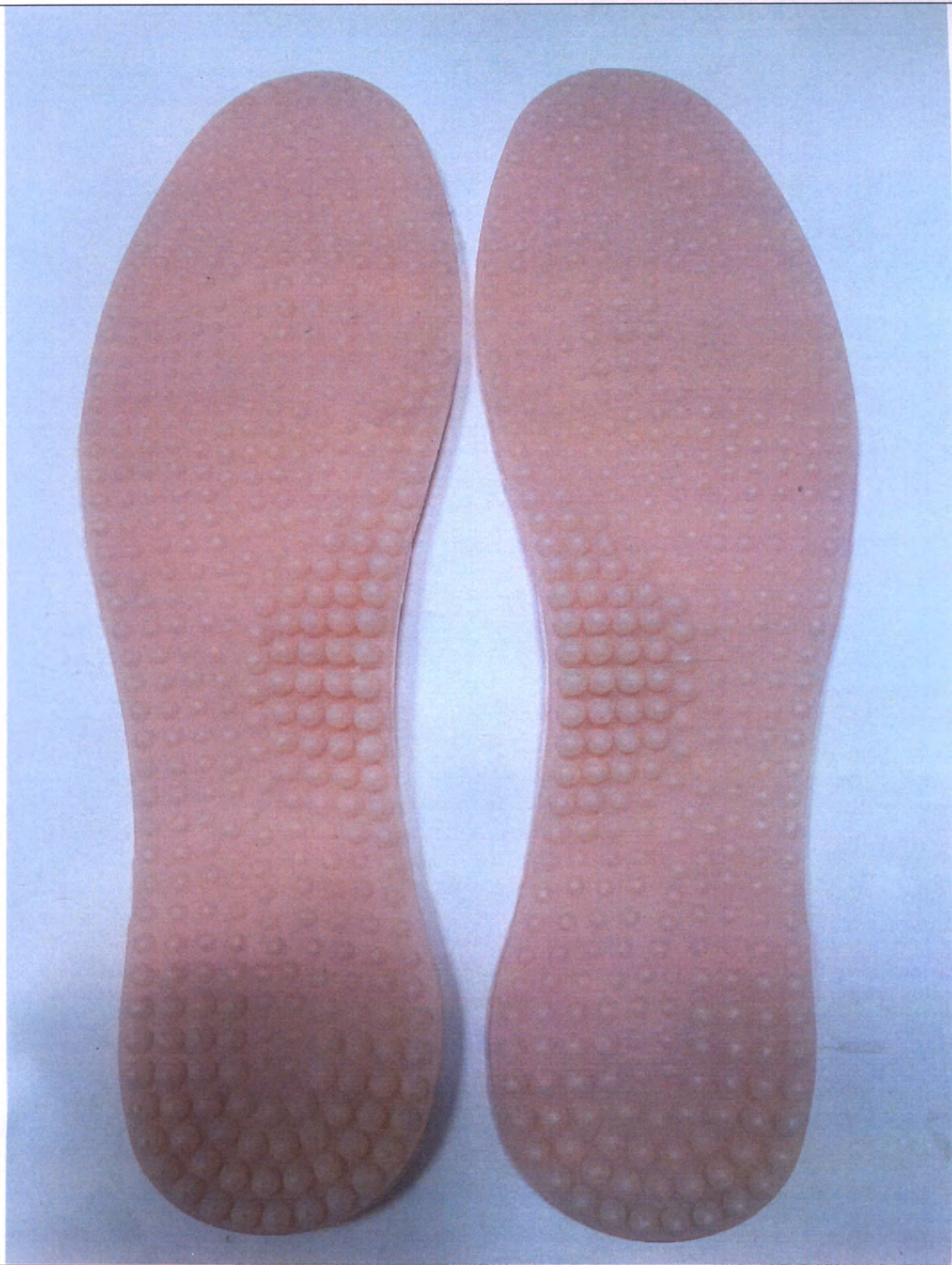


Стельки C-610




Стельки С-620

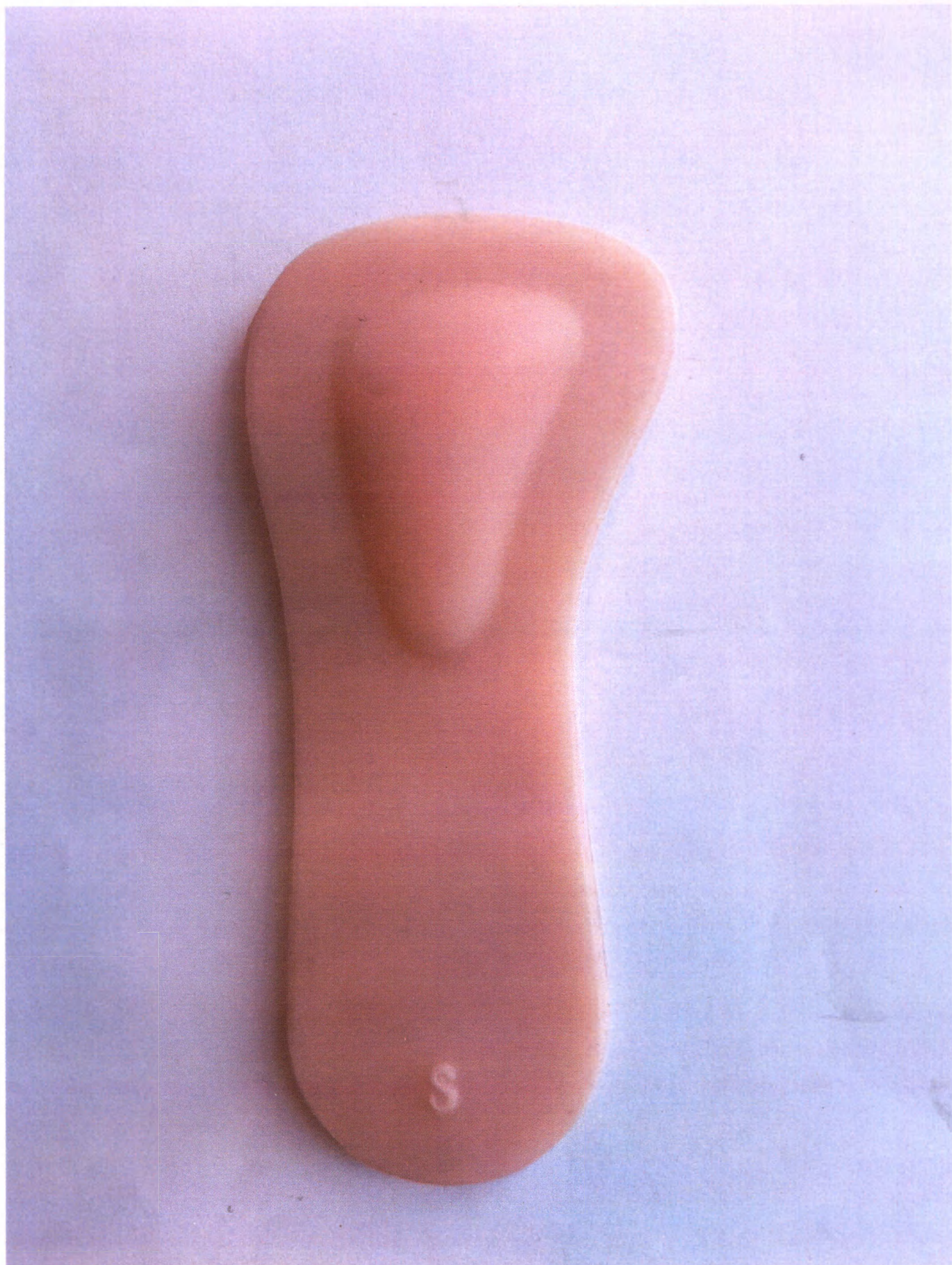

Полустельки С-500

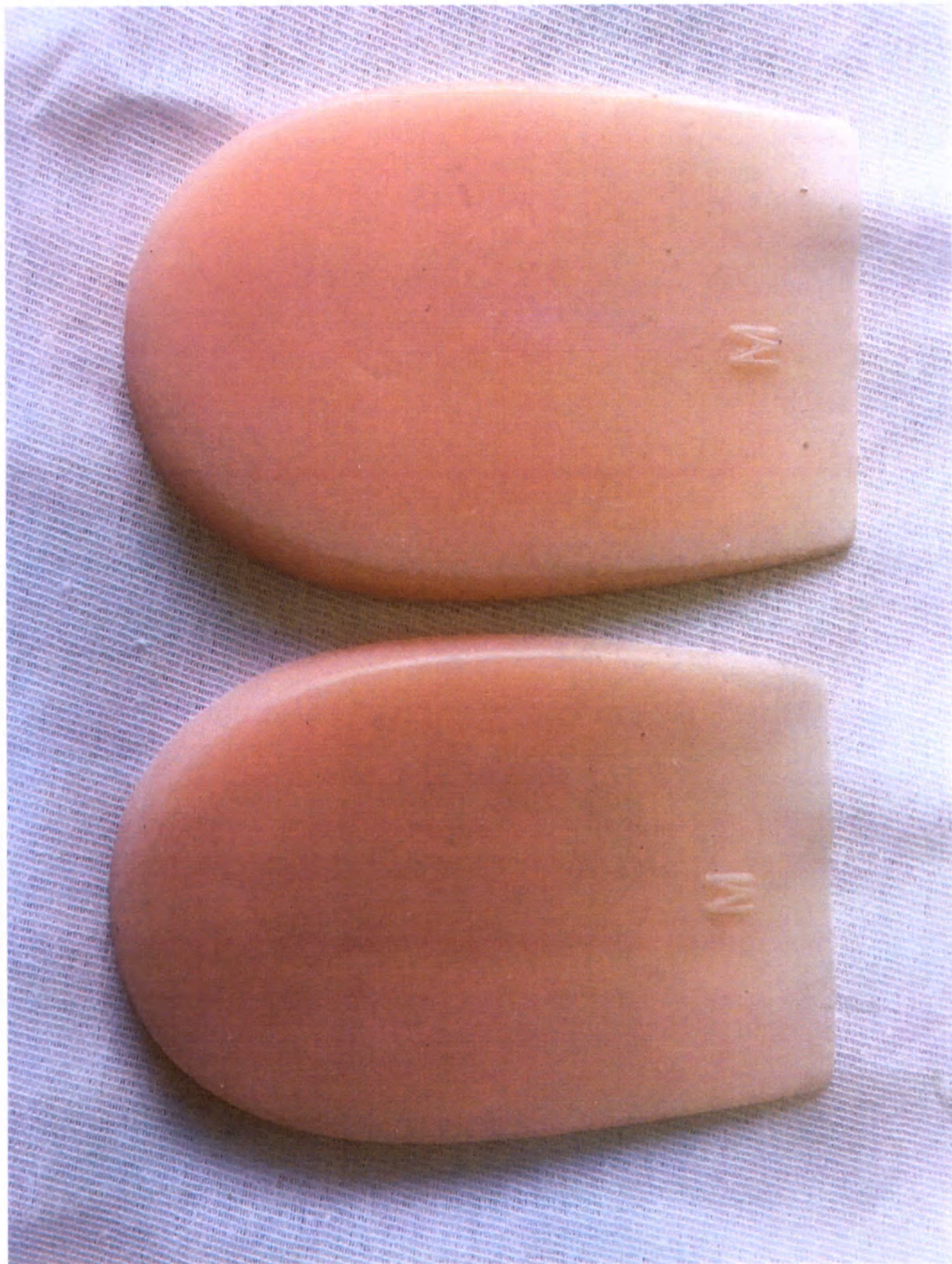

Подпяточник С-200

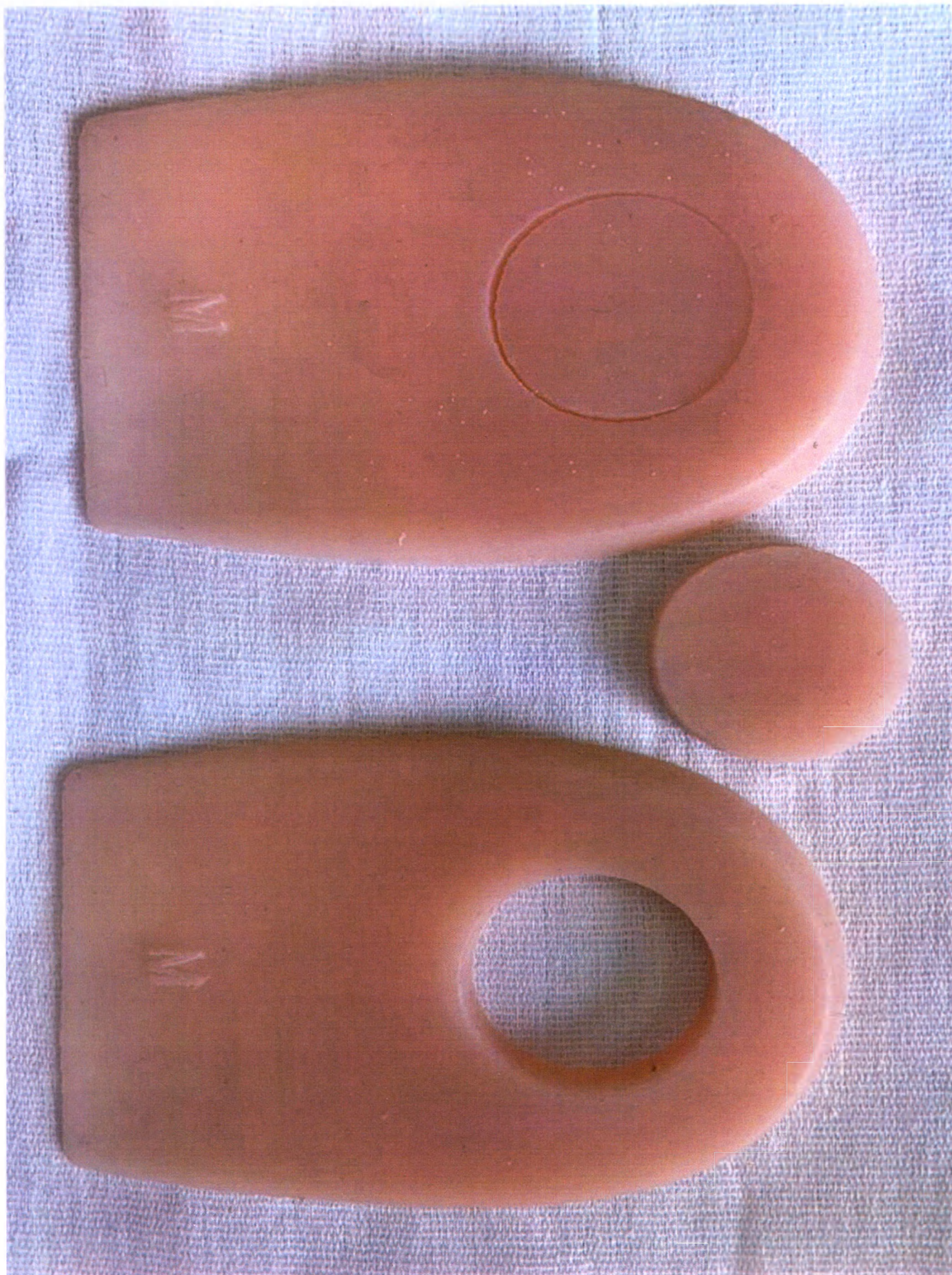

Подпяточник С-201



Подпяточник С-202



Подпяточник С-203

Прошито, пронумеровано

количество листов 8

Крив- / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ /
Подпись ДИРЕКТОР
КРИВИЦКАЯ И.А.
ФИО

ООО «Крейт»

Макеты маркировки потребительской упаковки

Стельки ортопедические и вкладные
приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024

Стельки ортопедические и вкладыши приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 96614693 - 2024 вариант исполнения:

СТЕЛКИ C-610

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

трофические осложнения при диабетической стопе, сосудистые заболевания ног, заболевания суставов ног, наличие мозолей, натоптышей, наминов, нагрузка на стопы, вызванная длительным нахождением на ногах, хроническая усталость ног, избыточный вес, беременность.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

потеря чувствительности, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОВОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить стельки в обуви.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Стельки с массажным эффектом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Размер	Размер обуви
☒ (35-40)	37-39
☐ (41-45)	
☐ (46-50)	

Состав: 100% медицинский силикон.

Комплект поставки включает:

- стельки C-610, одного из размеров - 1 пара;
- инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) - 1 шт.

Номер партии: _____
Отметка ОТК: _____

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.


Полная инструкция опубликована на сайте www.goszdravnadzor.gov.ru



Стельки ортопедические и вкладыши приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 96614693 - 2024 вариант исполнения:

СТЕЛКИ C-610

подвес внутри

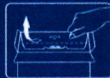

КРЕЙТ



Стельки ортопедические и вкладыши приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 96614693 - 2024 вариант исполнения:

СТЕЛКИ C-610

Продукция, изготовленная в соответствии с требованиями ГОСТ 31508-2012, с Санкт-Петербурга, улица Бутлерова, дом 11,
Санкт-Петербург, Россия. Контактный телефон: 8 (800) 700-09-08, e-mail: info@kreit.ru, www.kreit.ru
Срок годности: 5 лет. Дата изготовления: 15.05.2024. Информация об изделии: 15.05.2024. Информация об изделии: 15.05.2024.



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20__ года
Исделие транспортируется всеми видами транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 3. ГОСТ 31508-2012, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке производителя-изготовителя должно храниться на складе поставщика и потребителя в условиях хранения 3. ГОСТ 31508-2012, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не более чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Использование изделия исключено в непосредственной близости от оборудования класса А и выше, излучающего как таковые электромагнитные помехи в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.685-2021. Дата изготовления: 20__ г.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
стельки с массажным эффектом.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Размер обуви
☒ 1 (XS-M)	37-39
☐ 2 (L-XL)	
☐ 3 (XXL-3XL)	

Состав: 100% медицинский силикон.

Комплект поставки включает:

- стельки С-610, одного из размеров – 1 пара;
- инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

Номер партии: _____

Отметка ОТК: _____

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Срок хранения не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20__ года
№ ФСР _____

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3.684-2021.

Дата изготовления: _____ 20__ г.

Полная инструкция опубликована на сайте

 **КРЕЙТ**



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

СТЕЛЬКИ С-610



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ: стельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: трофические осложнения при диабетической стопе, сосудистые заболевания ног, заболевания суставов ног, наличие мозолей, натоптышей, наминов, нагрузка на стопы, вызванная длительным нахождением на ногах, хроническая усталость ног, избыточный вес, беременность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить стельки в обуви.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40°С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Стельки ортопедические и вкладыши приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 96814893 - 2024 вариант исполнения:

СТЕЛКИ C-620

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

стельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

трофические осложнения при диабетической стопе, сосудистые заболевания ног, заболевания суставов ног, наличие мозолей, натоптышей, наминов, нагрузка на стопы, вызванная длительным нахождением на ногах, хроническая усталость ног, избыточный вес, беременность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

потертости, ссадины, кровотокающие и/или инфицированные трещины кожи стоп, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить стельки в обуви.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

2 валика для продольного и поперечного свода стопы. Тонкий край в передней части стелек.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить адали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Размер	Размер обуви
☐ 1 (XS)	34-35
☐ 2 (S)	
☐ 3 (M)	
☐ 4 (L)	
☐ 5 (XL)	
☐ 6 (XXL)	
☐ 7 (XXXL)	

Состав: 100% медицинский силикон.

Комплект поставки включает:

• стельки C-620, одного из размеров - 1 пара;
• инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) - 1 шт.

Номер партии: _____

Отметка ОТК: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Полная инструкция опубликована на сайте www.goszdraznador.ru



подвес внутри



КРЕЙТ



Стельки ортопедические и вкладыши приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 96814893 - 2024 вариант исполнения:

СТЕЛКИ C-620

Промышленная, общепитовая и общественная торговля (ООО «Крейт», Россия, 191326, г. Санкт-Петербург, улица Бурлакова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 248, тел. 8 (800) 700-04-50, e-mail: info@kreit.ru, www.kreit.ru)
Срок службы изделия не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев.
www.kreit.ru



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20__ года
№ _____
Изделие транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-68, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предпринимателя-экспортера должно храниться на складе поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-68, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не более чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Исполненное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.688-2021.
Дата изготовления _____

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

2 валика для продольного и поперечного свода стопы. Тонкий край в передней части стелек.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Размер обуви
☐ 1 (XS)	34-35
☐ 2 (S)	
☐ 3 (M)	
☐ 4 (L)	
☐ 5 (XL)	
☐ 6 (XXL)	
☐ 7(3XL)	

Состав: 100% медицинский силикон.

Комплект поставки включает:

- стельки С-620, одного из размеров – 1 пара;
- инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

Номер партии:

Отметка ОТК:

Изделие применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Срок хранения не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20__ года
№ ФСР

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3.684-2021.

Дата изготовления: 20 ____ г.

Полная инструкция опубликована на сайте

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



КРЕЙТ



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

СТЕЛЬКИ С-620



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ: стельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: трофические осложнения при диабетической стопе, сосудистые заболевания ног, заболевания суставов ног, наличие мозолей, натоптышей, наминов, нагрузка на стопы, вызванная длительным нахождением на ногах, хроническая усталость ног, избыточный вес, беременность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровотокающие и/или инфицированные трещины кожи стоп, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить стельки в обуви.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 98814893 - 2024 вариант исполнения:

ПОЛУСТЕЛЬКИ C-500

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

полустельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

трофические осложнения при диабетической стопе, сосудистые заболевания ног, повышенное плоскостопие, травмы и деформации плоскостопальных суставов, натоптыши, мозоли, трещины в переднем отделе стопы, профилактика усталости при длительном пребывании на ногах, профилактика уплотнения переднего отдела стопы в модельной обуви и в обуви на высоком каблуке.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить полустельки в обуви.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

полустельки с амортизирующим Т-образным валиком под 2-3-4 плюсовые кости. Для обуви на каблуке выше 5 см.

Размер	Размер обуви
1 (S)	34-35
2 (M)	
3 (L)	
4 (XL)	
5 (XXL)	
6 (3XL)	
7 (4XL)	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице размеров. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на упаковке. Не использовать абразив открытого пламени. Изделия из сополимера нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Изделие обрабатывать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтрального моющего средства при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Состав:

Комплект поставки включает:

- полустельки C-500, одного из размеров - 1 пар;
- инструкцию по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) - 1 шт.

Номер партии: _____

Отметка ОТР: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие медицинского назначения.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31509-2012.

Полная инструкция опубликована на сайте www.goszdravnadzor.gov.ru

подвес внутри



 КРЕЙТ



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 - 018 - 98814893 - 2024 вариант исполнения:

ПОЛУСТЕЛЬКИ C-500

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195260, г. Санкт-Петербург, ул. Кутузова, д.11, корпус 4, литера А, пом. 24Н, тел. в 800 790 48 - 50, e-mail: info@kreit.ru, kreit@mail.ru, www.kreit.ru
Срок службы изделия - не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев.
www.kreit.ru, www.zdrav.ru



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20____ года
№ ФСР _____

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С, и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Исполненное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2021. Дата изготовления: _____ 20____ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Полустельки с амортизирующим Т-образным валиком под 2-3-4 плюсневые кости. Для обуви на каблук выше 5 см.



Размер	Размер обуви
☐ 1 (S)	34-35
☐ 2 (M)	
☐ 3 (L)	
☐ 4 (XL)	
☐ 5 (XXL)	
☐ 6 (3XL)	
☐ 7 (4XL)	

Состав:

Комплект поставки включает:

- полустельки С-500, одного из размеров – 1 пара;
- инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

Номер партии: _____

Отметка ОТК: _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.


Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург; улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.
Срок хранения не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20__ года
№ ФСР _____

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температур от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температур от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-2021.
Дата изготовления: 20 ____ г.

Полная инструкция опубликована на сайте www.roszdravnadzor.gov.ru

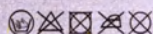

 КРЕЙТ



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОЛУСТЕЛЬКИ С-500



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ: полустельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: трофические осложнения при диабетической стопе, сосудистые заболевания ног, поперечное плоскостопие, травмы и деформации плюснефаланговых суставов, натоптыши, мозоли, трещины в переднем отделе стопы, профилактика усталости при длительном пребывании на ногах, профилактика уплощения переднего отдела стопы в модельной обуви и в обуви на высоком каблуке.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровотокающие и/или инфицированные трещины кожи стоп, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить полустельки в обуви.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40°С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК

C-200

Размер	Размер обуви
☐ №1 (S)	
☐ №2 (M)	
☒ №3 (L)	44-47

НАЗНАЧЕНИЕ: подпяточник предназначен для восстановления или компенсации структурных изменений формы стопы в пяточной области: пяточной шпоре, мозолей, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви, длительного пребывания на ногах, профических изменений кожи в области пятки, реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: опухоль, опрелости, ссадины, кровотокающие и/или инфицированные раны, стеснение, зуд, индивидуальная непереносимость составляющих изделий.

ПОВЕДЕНИЕ: изделие контактирует с кожей при индивидуальной непереносимости материала прокладок.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: подпяточник C-200, одного из размеров – 1 пара. Инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергической реакции на материал. Не допускается применение по истечению срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать изделия открытого пламени.

Упаковка: изделие из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: подпяточник C-200 предназначен для обуви с закрытой пяткой.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вернуть упаковке, додать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части, надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплой водой, раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40°С, хорошо прополоснуть в прохладной воде, промокнуть, повесить, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать только.

НОМЕР ПАРТИИ: изделие применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Полная инструкция опубликована на сайте www.gosizdatnadzor.gov.ru


Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК

C-200



повес внутри

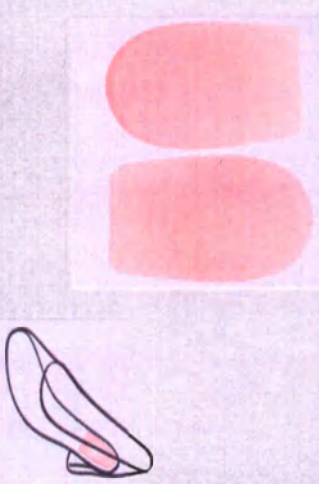

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-08-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.
Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения изделия не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.
Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3.684-2021.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК

C-200

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от 20 года
№ ФСР

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: подпяточник С-200 предназначен для обуви с закрытой пяткой.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части, надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от № ФСР 20 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения изделия не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.


СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 г.

Полная инструкция опубликована на сайте www.roszdravnadzor.gov.ru



Размер	Размер обуви
☐ №1 (S)	
☐ №2 (M)	
☒ №3 (L)	44-47

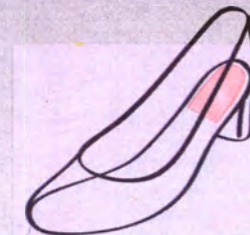

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК С-200



НАЗНАЧЕНИЕ: подпяточник предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: боли в пяточной области; наличие пяточной шпоры, мозолей, наминов, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви; длительное пребывание на ногах; трофические изменения кожи в области пятки; реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп; индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: подпяточник С-200, одного из размеров – 1 пара. Инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: подпяточник С-201 предназначен для обуви с закрытой пяткой, имеет съемный пяточный амортизатор.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части, при необходимости извлечь вставку. Надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от № ФСР 20 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения изделия не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 г.

Размер	Размер обуви
☐ №1 (S)	
☒ №2 (M)	41-44
☐ №3 (L)	

Полная инструкция опубликована на сайте www.roszdravnadzor.gov.ru



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК С-201



НАЗНАЧЕНИЕ: подпяточник предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: боли в пяточной области; наличие пяточной шпоры, мозолей, наминов, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви; длительное пребывание на ногах; трофические изменения кожи в области пятки; реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп; индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: подпяточник С-201, одного из размеров – 1 пара. Инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК C-202

НАЗНАЧЕНИЕ: подпяточник предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: боли в пяточной области; наличие пяточной шпоры, мозолей, нагноений, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви; длительное пребывание на ногах; артриты, артрозы голеностопного сустава; трофические изменения кожи в области пятки; реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровотечения и/или инфицированные трещины кожи стоп; индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: подпяточник C-202, одного из размеров – 1 пара. Инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: подпяточник C-202 предназначен для обуви с закрытой пяткой. Имеет анатомическую форму с бортиками.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °C до 40 °C. Вскрыть упаковку, достать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части, надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °C, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Размер	Размер обуви
☐ №1 (S)	
☐ №2 (M)	
☒ №3 (L)	40-45


Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК C-202

подвес внутри



КРЕЙТ

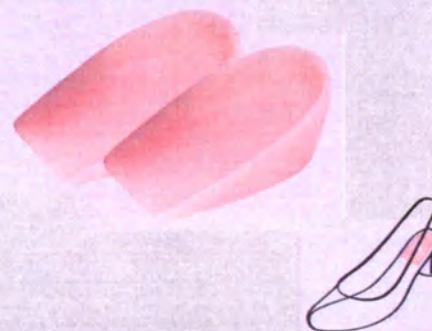

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК C-202

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), расположенное по адресу: 119121, г. Москва, ул. Ботарская, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-08-50; e-mail: info@kreit.ru, kreit@mail.ru.
Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °C до +40 °C. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 31510-2012, обеспечивающих сохранение свойств изделия и сохранение срока годности. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения изделия не менее 6 лет.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.
Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.36.002-2011.
www.kreit.ru, www.zdor.ru



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от _____ 20____ года.
№ ФСР _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: подпяточник С-202 предназначен для обуви с закрытой пяткой. Имеет анатомическую форму с бортиками.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части, надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от № ФСР 20 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения изделия не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 г.

Полная инструкция опубликована на сайте www.roszdravnadzor.gov.ru



Размер	Размер обуви
☐ №1 (S)	
☐ №2 (M)	
☒ №3 (L)	40-45



Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК С-202



НАЗНАЧЕНИЕ: подпяточник предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: боли в пяточной области; наличие пяточной шпоры, мозолей, наминов, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви; длительное пребывание на ногах; артриты, артрозы голеностопного сустава; трофические изменения кожи в области пятки; реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп; индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: подпяточник С-202, одного из размеров – 1 пара. Инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.



ПОДПЯТОЧНИК
C-203

СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

Размер	Размер обуви
☒ №1	38-41
☐ №2	

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК
C-203

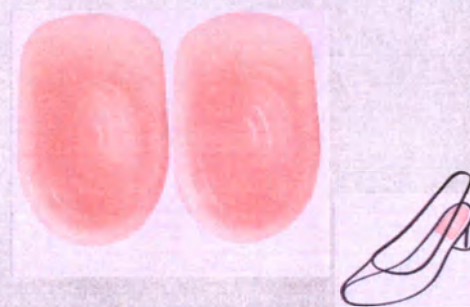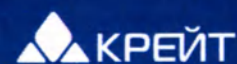

ПОДПЯТОЧНИК
С-203

[illegible]

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от 20 года.
№ФСР

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции. Не использовать вблизи открытого пламени. Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: подпяточник С-203 предназначен для обуви с закрытой пяткой. Имеет ребристую поверхность.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С. Вскрыть упаковку, достать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части, надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40 °С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.
№ ФСР _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения изделия не менее двух лет. Срок службы изделия не менее 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев.

Использованное изделие складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

НОМЕР ПАРТИИ:

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.


СОСТАВ: 100% медицинский силикон.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ 20 ____ г.

Полная инструкция опубликована на сайте www.roszdravnadzor.gov.ru



Размер	Размер обуви
☒ №1	38-41
☐ №2	

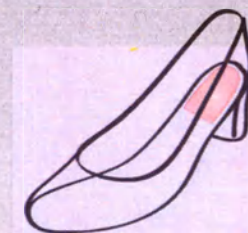

Стельки ортопедические и вкладные приспособления для стопы
по ТУ 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024 вариант исполнения:

ПОДПЯТОЧНИК С-203



НАЗНАЧЕНИЕ: подпяточник предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: боли в пяточной области; наличие пяточной шпоры, мозолей, наминов, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви; длительное пребывание на ногах; трофические изменения кожи в области пятки; реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп; индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: подпяточник С-203, одного из размеров – 1 пара. Инструкция по применению (допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку) – 1 шт.

Прошито, пронумеровано

количество листов 15



[Handwritten signature]

Подпись

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КРИВИЦКАЯ И.А.
ФИО

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ



При получении груза проверить целостность упаковки

Получатель: АО «ВНИИМТ»

Адрес: 115459, Россия, Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 42

Телефон: +7 495 660-30-39


Номер заказа: 100985

Вес брутто: 2,2 кг


Отправитель: ООО «Крейт»

Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 11, корп. 4, литер А, пом. 24Н

Телефон 8 (812) 748-25-00

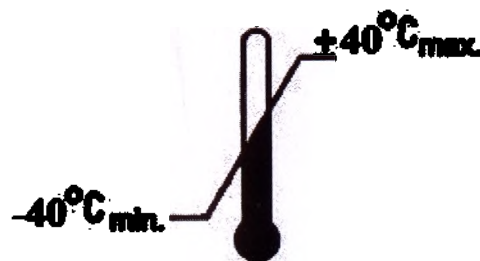

Условия транспортирования

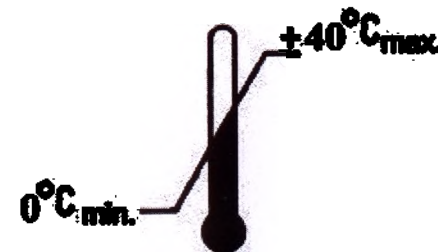

Условия хранения