


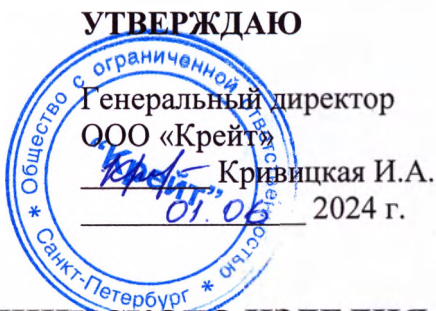

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
И ВКЛАДНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТОПЫ
по 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024,
варианта исполнения:**

Стельки следующих артикулов:

Стельки С-610, размер: №1(XS-M), №2(L-XL), №3(XXL-3XL)

Стельки С-620, размер: №1(XS), №2(S), №3(M), №4(L), №5(XL), №6(XXL), №7(3XL)

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 2.1. Диабетическая стопа;
- 2.2. Трофические нарушения стоп;
- 2.3. Сосудистые заболевания ног;
- 2.4. Заболевания суставов ног;
- 2.5. Наличие мозолей, натоптышей, наминов;
- 2.6. Нагрузка на стопы, вызванная длительным нахождением на ногах;
- 2.7. Хроническая усталость ног;
- 2.8. Избыточный вес;
- 2.9. Беременность.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 3.1 Потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп
- 3.2 Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во
Стельки С-610, размер: №1(XS-M), №2(L-XL), №3(XXL-3XL) в составе:	
Стельки С-610, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

Наименование изделия	Кол-во
Стельки С-620, размер: №1(XS), №2(S), №3(M), №4(L), №5(XL), №6(XXL), №7(3XL) в составе:	
Стельки С-620, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
6.2 Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
6.3 Не допускается применять по истечении срока хранения.
6.4 Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции.
6.5 Не использовать вблизи открытого пламени.
6.6 Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7.1 Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1 - Основные размеры - Стельки С-610

Размер	*Размер обуви	Масса, г
1 (XS-M)	37-39	60,2
2 (L-XL)	40-42	71,8
3 (XXL-3XL)	43-45	83,4

Таблица 2 - Основные размеры - Стельки С-620

Размер	*Размер обуви	Масса, г
1 (XS)	34-35	80,2
2 (S)	35-36	90,5
3 (M)	37-38	104,9
4 (L)	39-40	123,4
5 (XL)	40-41	129,2
6 (XXL)	42-43	135,1
7(3XL)	44-45	141,0

*Справочный размер для подбора изделия.

- 7.2 Основные материалы приведены в таблице 3

Таблица 3 – Основные материалы изделий артикулов

Наименование исполнения	Основной материал
Стельки С-610	Силикон Тальк (присыпка детская)
Стельки С-620	

- 7.3 Особенности конструкции изделий приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Особенности конструкции изделий артикулов

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Стельки С-610	Стельки с массажным эффектом

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С.

8.2 Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить стельки в обуви.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40°С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3 Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4 Срок хранения не менее двух лет.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев.

11.3 Срок службы изделий должен быть не менее 6 месяцев

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

QR-код для перехода на сайт изготовителя указан на упаковке.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
СТЕЛЬКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
И ВКЛАДНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТОПЫ
по 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024,
варианта исполнения:**

Полустельки следующих артикулов:

Полустельки С-500, размер: №1(S), №2(M), №3(L), №4(XL), №5(XXL), №6(3XL), №7(4XL)

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Полустельки предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 2.1. Диабетическая стопа;
- 2.2. Трофические нарушения стоп;
- 2.3. Сосудистые заболевания ног;
- 2.4. Поперечное плоскостопие;
- 2.5. Травмы и деформации плюснефаланговых суставов;
- 2.6. Натоптыши, мозоли, трещины в переднем отделе стопы;
- 2.7. Профилактика усталости при длительном пребывании на ногах;
- 2.8. Профилактика уплощения переднего отдела стопы в модельной обуви и в обуви на высоком каблуке.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 3.1 Потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп
- 3.2 Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во
Полустельки С-500, размер: №1(S), №2(M), №3(L), №4(XL), №5(XXL), №6(3XL), №7(4XL) в составе:	
Полустельки С-500, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
6.2 Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
6.3 Не допускается применять по истечении срока хранения.
6.4 Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции.
6.5 Не использовать вблизи открытого пламени.
6.6 Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7.1 Размерный ряд и масса изделий указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Основные размеры - Полустельки С-500

Размер	*Размер обуви	Масса, г
1 (S)	31-33	28,1
2 (M)	34-35	29,8
3 (L)	36-37	34,0
4 (XL)	38-39	36,6
5 (XXL)	40-41	38,2
6 (3XL)	42-43	40,3
7 (4XL)	44-45	42,5

*Справочный размер для подбора изделия.

- 7.2 Основные материалы приведены в таблице 2

Таблица 2 – Основные материалы изделий артикулов

Наименование исполнения	Основной материал
Полустельки С-500	Силикон Тальк (присыпка детская)

- 7.3 Особенности конструкции изделий приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Особенности конструкции изделий артикулов

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Полустельки С-500	Полустельки с амортизирующим Т-образным валиком под 2-3-4 плюсневые кости. Для обуви на каблуке выше 5 см.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- 8.1 Изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С.
8.2 Вскрыть упаковку, достать изделие. Расположить полустельки в обуви.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40°С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- 9.2 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- 9.3 Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- 9.4 Срок хранения не менее двух лет.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев.
- 11.3 Срок службы изделий должен быть не менее 6 месяцев

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

QR-код для перехода на сайт изготовителя указан на упаковке.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Крейт»

Кривицкая И.А.

2024 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
И ВКЛАДНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТОПЫ
по 32.50.22 – 018 – 96814693 – 2024,
варианта исполнения:**

Подпяточник следующих артикулов:

Подпяточник С-200, размер: №1 (S), №2 (M), №3 (L)

Подпяточник С-201, размер: №1 (S), №2 (M), №3 (L)

Подпяточник С-202, размер: №1 (S), №2 (M), №3 (L)

Подпяточник С-203, размер: №1, №2

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделие применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подпяточник предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1. Боли в пяточной области (С-200, С-201, С-202, С-203);

2.2. Наличие пяточной шпоры, мозолей, наминов, натоптышей и других образований, возникающих в результате трения и давления обуви (С-200, С-201, С-202, С-203);

2.3. Длительное пребывание на ногах;

2.4. Артриты, артрозы голеностопного сустава (С-202);

2.5. Трофические изменения кожи в области пятки;

2.6. Реабилитация после травм пятки, ахиллова сухожилия, голеностопного и подтаранного суставов.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.1 Потертости, ссадины, кровоточащие и/или инфицированные трещины кожи стоп

3.2 Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во
Подпяточник С-200, размер: №1 (S), №2 (M), №3 (L) в составе:	
Подпяточник С-200, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

Наименование изделия	Кол-во
Подпяточник С-201, размер: №1 (S), №2 (M), №3 (L) в составе:	
Подпяточник С-201, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

Наименование изделия	Кол-во
Подпяточник С-202, размер: №1 (S), №2 (M), №3 (L) в составе:	
Подпяточник С-202, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

Наименование изделия	Кол-во
Подпяточник С-203, размер: №1, №2 в составе:	
Подпяточник С-203, одного из размеров	1 пара
Инструкция по применению	1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
6.2 Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
6.3 Не допускается применять по истечении срока хранения.
6.4 Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные в инструкции.
6.5 Не использовать вблизи открытого пламени.
6.6 Изделия из силикона нельзя использовать совместно с косметическими средствами для ног.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7.1 Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 - Основные размеры - Подпяточник С-200

Размер	*Размер обуви	Масса, г $\pm 20\%$
№1 (S)	37-40	26,4
№2 (M)	41-44	34,7
№3 (L)	44-47	49,2

Таблица 2 - Основные размеры - Подпяточник С-201

Размер	*Размер обуви	Масса, г $\pm 20\%$
№1 (S)	37-40	26,6
№2 (M)	41-44	35,3
№3 (L)	45-47	41,0

Таблица 3 - Основные размеры - Подпяточник С-202

Размер	*Размер обуви	Масса, г $\pm 20\%$
№1 (S)	27-32	23,0
№2 (M)	33-39	41,0
№3 (L)	40-45	53,0

Таблица 4 - Основные размеры - Подпяточник С-203

Размер	*Размер обуви	Масса, г $\pm 20\%$
№1	38-41	18,0
№2	41-47	32,0

*Справочный размер для подбора изделия.

7.2 Основные материалы приведены в таблице 5

Таблица 5 – Основные материалы изделий артикулов

Наименование исполнения	Основной материал
Подпяточник С-200	Силикон Тальк (присыпка детская)
Подпяточник С-201	
Подпяточник С-202	
Подпяточник С-203	

7.3 Особенности конструкции изделий приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Особенности конструкции изделий артикулов

Наименование исполнения	Особенности конструкции
Подпяточник С-200	Для обуви с закрытой пяткой.
Подпяточник С-201	Для обуви с закрытой пяткой. Съемный пяточный амортизатор
Подпяточник С-202	Для обуви с закрытой пяткой. Анатомическая форма с бортиками
Подпяточник С-203	Для обуви с закрытой пяткой. Имеют ребристую поверхность

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1 Изделие эксплуатировать при температуре от 0 °С до 40 °С.

8.2 Вскрыть упаковку, достать изделие. Разместить изделие в обуви в пяточной части (С-200, С-201, С-202, С-203), при необходимости извлечь вставку (С-201). Надеть обувь.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие обработать теплым водным раствором детского мыла или раствором нейтральных моющих средств при температуре не выше 40°С, хорошо прополоснуть в проточной воде, промокнуть полотенцем, высушить вдали от нагревательных приборов. Изделие перед использованием обработать тальком.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150-69, но для температуры от 0 °С до +40 °С и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3 Изделие должно быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4 Срок хранения не менее двух лет.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев.

11.3 Срок службы изделий должен быть не менее 6 месяцев

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

QR-код для перехода на сайт изготовителя указан на упаковке.

Прошито, пронумеровано

количество листов 10

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР

КРИВИЦКАЯ И.А.

ФИО

Подпись

