

УТВЕРЖДАЮ / «APPROVE»
ООО «НЬЮФАРМ-ТРЕЙД» / ООО «NEWPHARM-TRADE»



Директор
(подпись)
Хамидова А.А.

«22» июля 2024 г.

Инструкция по применению

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках и рулонах
(артикулы NFT 13, NFT 15, NFT 17, NFT 19) в вариантах исполнения,
производства ООО «NEWPHARM-TRADE» (ООО «НЬЮФАРМ-ТРЕЙД»),
Республика Узбекистан

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	6
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ	6
4. МАРКИРОВКА	6
5. УПАКОВКА.....	7
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	8
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	8
8. УТИЛИЗАЦИЯ	9
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	9
10. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ.....	9
11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на медицинское изделие «Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках и рулонах (артикулы NFT 13, NFT 15, NFT 17, NFT 19) в вариантах исполнения» (далее – марля, изделие).

Наименование медицинского изделия: Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках и рулонах (артикулы NFT 13, NFT 15, NFT 17, NFT 19) в вариантах исполнения

Варианты исполнения:

1. Исполнение 1 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м, 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 13)
2. Исполнение 2 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 13)
3. Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м, 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 15)
4. Исполнение 4 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 15)
5. Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м, 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 17)
6. Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 17)
7. Исполнение 7 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м, 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 19)
8. Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 19)

Сведения о разработчике и производителе медицинского изделия

Разработчик и производитель: Общество с ограниченной ответственностью «NEWPHARM-TRADE» (ООО «НЬЮФАРМ-ТРЕЙД»), Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Мустакиллик Шох, д. 88.

Место производства медицинского изделия: Республика Узбекистан, Ташкентская область, Паркентский район, село Ёшлик, ул. Янгикургон-2, д. 28.

Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАХАРЬ», 155831, Ивановская область, р-н Кинешемский, г. Наволоки, ул. Больничный городок, д. 2.

Назначение: Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная предназначена для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), а также в составе ватно-марлевых повязок.

Описание изделия: Изделие в форме длинной полоски из растягивающейся впитывающей хлопчатобумажной пряжи, выпускающейся в кусках или в рулонах, для использования в различных медицинских целях. Это нестерильное изделие для одноразового использования.

Функциональное назначение: для изготовления в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений сорбционных перевязочных средств, ватно-марлевых повязок.

Область применения: применяется профессионально в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Принцип действия: применяется в качестве основы для перевязочного материала, впитывающего жидкость. Может использоваться в качестве материала для изготовления средств индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевых повязок).

Информация о потенциальных потребителях: квалифицированные специалисты лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Показания к применению: необходимость впитывания жидкостей в медицинских целях для очищения. Марля с поверхностной плотностью 24,0 г/м², 28,0 г/м², 30,0 г/м², 34,0 г/м² пригодна для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), а также в составе ватно-марлевых повязок.

Противопоказания к применению: Противопоказаний не выявлено.

Возможные побочные эффекты: Побочных эффектов не выявлено.

Классификация

Класс изделия в зависимости от потенциального риска применения – 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 150130.

Код ОКПД 2 – 13.20.44.120.

Марля поставляется нестерильной.

Марля изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям марля соответствует требованиям стандартов серии ISO 10993.

По кратности применения относится к изделиям однократного применения.

Меры безопасности и предосторожности:

1. В условиях эксплуатации марля должна быть нетоксичной и отвечать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения и не вызывать при контакте с кожей местно-раздражающих и аллергических эффектов.

2. Марля не подлежит стерилизации!

3. Марля не подлежит повторному использованию!

2. Не использовать при контакте с поврежденными кожными покровами, а также в стерильных помещениях (например, в операционной).

3. Производство марли не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсибилизирующего воздействия на человека.

4. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок.

5. Запрещено использовать марлю в случае повреждения упаковки, окончания срока годности или наличия видимых дефектов.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Описание медицинского изделия

Марля выпускается в кусках шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м.

Также марля выпускается в рулонах шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м, 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м. Рулоны выпускаются без втулки.

Марля во всех вариантах исполнения выпускается в различных вариациях указанных выше размеров в зависимости от условий заказа.

Допускаемое отклонение линейных размеров и массы, заявленных на упаковке изделия, не более 10%.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Марля должна соответствовать требованиям Технического файла и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

1.2.2 По физико-механическим показателям марля должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические параметры марли

Артикул	Наименование показателя				
	Поверхностная плотность, г/м ²	Число нитей на 10см*		Разрывная нагрузка полоски размером 50×200мм, Н (кгс), не менее	
		по основе	по утку	по основе	по утку
NFT13	24,0±2,0	98±2	45±3	48,0 (4,9)	19,6 (2,0)
NFT15	28,0±2,0	98±2	50±3	49,0 (5,0)	21,56 (2,2)
NFT17	30,0±2,0	98±2	65±3	49,0 (5,0)	22,54 (2,3)
NFT19	34,0±2,0	100±2	60±3	65,0 (6,5)	30,0 (3,0)

* – плюсовые допускаемые отклонения по числу нитей на 10см для марли не ограничиваются.

1.2.3 По физико-химическим показателям марля отбеленная должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели марли

Наименование показателя	Значение
1. Реакция водной вытяжки, ед. pH	6–8
2. Массовая доля хлористых солей, %, не более	0,02
3. Массовая доля сернокислых солей, %, не более	0,02
4. Массовая доля кальциевых солей, %, не более	0,06
5. Время определения содержания окисляемых веществ, мин, не менее	5,0
6. Содержание аппретирующих веществ	не допускается
7. Содержание окрашивающих веществ	бесцветные вытяжки
8. Массовая доля жировых веществ, %, не более	0,3
9. Смачиваемость, с, не более	10,0
10. Капиллярность, см/ч, не менее:	
-для исполнения NFT19	9,0
-для исполнений NFT13, NFT15, NFT17	7,0
11. Влажность, %;	5,0–8,5
12. Зольность, %, не более	0,3
13. Содержание оптического отбеливателя	Не допускается
14. Белизна, %, не менее	80,0
15. Степень устойчивости белизны, %, не более	10

1.2.4 Не допускаются несшитые куски марли, а также сшивка марли с различными видами кромки. Сшивка марли производится на швейной машине с оверлочной строчкой.

Расстояние от конца куска или рулона до шва и между швами не должно быть менее 10 м.

1.2.5 В марле не допускаются две группы дефектов внешнего вида:

– дефекты 1-й группы – дыры по фону марли размером более 5см, масляные и грязные пятна, стянутая кромка более 1 м по длине ткани;

– дефекты 2-й группы – недосеки более трех нитей, недоуток более трех нитей, подплетины более пяти нитей, белизны в три и более нитей, бахрома на кромке более 1,5 см с одной стороны и более 2 см с другой стороны.

Дефекты 1-й группы должны быть вырезаны на предприятии-изготовителе.

Дефекты 2-й группы считают условным вырезом. Размер условного выреза не должен превышать 30 см по длине

марли. Длину условных вырезов марли в общую меру длины куска или рулона не включают, а учитывают как весовой доскут.

1.2.6 Марлю складывают в куски или наматывают в рулоны ровно без перекосов и свисания кромок.

1.2.7 Марля в транспортной упаковке должна быть устойчива к климатическим воздействиям по группе 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150 при температуре от +50°C до -50°C и относительной влажности воздуха до 100% при +25°C при транспортировании.

1.2.8 Условия хранения марли по группе 2 (С) в соответствии с ГОСТ 15150 при температуре от +40°C до -50°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

1.2.9 Срок годности марли составляет 5 лет с даты производства. Критерии предельного состояния – несоответствие требованиям пп. 1.2.2-1.2.5 Технического файла.

2. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

2.1 При изготовлении марли применяется сырьё и материалы, указанные в таблице 3, и имеющее сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

Таблица 3 – Материалы, использованные при производстве марли

Наименование	Материал, марка	Производитель	Тип контакта согласно ГОСТ ISO 10993-1
Пряжа хлопчатобумажная ОЕ 50/1	100% хлопковое волокно	FERGANA OSEANA TEXTILE, ООО СП, Узбекистан	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
Пакеты из полиэтиленовой пленки	«Н», «В», 2	ЧП «LEADER PLAST PRODUCTION», Узбекистан	-
Оберточная бумага	Сульфатная оберточная целлюлоза	«ЧП «LEADER PLAST PRODUCTION», Узбекистан	-

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Применять для изготовления операционно-перевязочных средств.

3.2 Перед работой с марлей ознакомьтесь с инструкцией по применению.

3.3 Используйте марлю исключительно в соответствии с протоколами, утвержденными вашим медицинским учреждением.

3.4 Не извлекайте марлю из упаковки до тех пор, пока не будете готовы к ее применению.

3.5 Используйте марлю сразу после извлечения из упаковки.

3.6 Не используйте острые инструменты (например, лезвия, ножницы) при вскрытии упаковки марли.

3.7 Не используйте марлю после истечения срока годности.

3.8 При использовании марли необходимо обязательно соблюдать правила асептики и антисептики в условиях медицинского учреждения.

3.9 Запрещается использовать марлю повторно.

3.10 Марля применяется в климатических условиях УХЛ 4.2 при температуре от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 95%.

4. МАРКИРОВКА

4.1 Маркировка должна соответствовать требованиям настоящего технического файла, а применяемые символы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1.

4.2 На каждую потребительскую упаковку марли наносится маркировочная надпись, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1. В содержании маркировочной надписи этикетки должны быть указаны следующие символы:

- | Информация | Символ |
|---|---|
| - наименование изделия, обозначение варианта исполнения | — |
| - сведения о производителе (наименование, адрес, телефон, e-mail) |  |
| - сведения об уполномоченном представителе | — |
| - дата изготовления медицинского изделия |  |
| - срок годности медицинского изделия (год, месяц включительно) |  |
| - показания и противопоказания к применению | — |
| - изделие нестерильно |  |
| - номер партии |  |
| - номер и дата регистрационного удостоверения | — |
| - размер | — |
| - артикул | — |

- условия транспортирования и хранения



- условия утилизации

4.3 Маркировка транспортной упаковки должна быть выполнена печатным способом, с использованием символов по ГОСТ Р ИСО 15223-1. Маркировка должна наноситься на этикетку, приклеиваемую к транспортной упаковке. Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую информацию:

Информация

Символ

- наименование изделия
- сведения о производителе (наименование, адрес, телефон, e-mail)
- сведения об уполномоченном представителе
- дата изготовления медицинского изделия
- срок годности медицинского изделия (год, месяц включительно)
- номер (код) партии
- число единиц потребительской упаковки изделий в групповой упаковке
- размер изделия
- артикул
- масса нетто
- масса брутто
- условия транспортирования и хранения
- «Не допускать воздействия влаги»
- «Не допускать воздействия солнечного света»



5. УПАКОВКА

5.1 Рулоны марли упаковывают в потребительскую упаковку – в оберточную бумагу по ГОСТ 8273. Рулоны выпускаются без втулки. На каждую потребительскую упаковку наносится этикетка с маркировкой по п. 3.2 настоящего технического файла.

5.2 Куски марли упаковывают в потребительскую упаковку – пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. На каждую потребительскую упаковку наносится этикетка с маркировкой по п. 3.2 настоящего технического файла.

Таблица 4 – Состав потребительских упаковок каждого варианта исполнения материала

№	Состав потребительской упаковки изделия
1	Исполнение 1 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м ² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 13) в составе: - Исполнение 1 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
2	Исполнение 2 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м ² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 13) в составе: - Исполнение 2 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
3	Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м ² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 15) в составе: - Исполнение 3 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
4	Исполнение 4 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м ² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 15) в составе: - Исполнение 4 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
5	Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м ² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 17) в составе: - Исполнение 5 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
6	Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м ² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 17) в составе: - Исполнение 6 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
7	Исполнение 7 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м ² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м,

№	Состав потребительской упаковки изделия
	500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 19) в составе: - Исполнение 7 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.
8	Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м ² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 19) в составе: - Исполнение 8 – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт.

5.3 Для транспортирования марлю в кусках в потребительской упаковке укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514. На каждую транспортную тару наносится этикетка с маркировкой по п. 3.3 настоящего технического файла.

5.4 Для транспортирования марлю в рулонах в потребительской упаковке укладывают в мешки из полипропиленовой ткани по ГОСТ 32522. На каждую транспортную тару наносится этикетка с маркировкой по п. 3.3 настоящего технического файла.

5.5 Изделия в потребительских упаковках уложены в транспортную тару, которая должна обеспечивать защиту от внешних механических повреждений.

5.6 В транспортную тару упаковывается количество изделий в потребительской упаковке в количестве от 1 до 90 штук.

5.7 Фотографические изображения изделий в упаковке приведены в Приложении А.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 В комплект поставки должны входить:

- Марля одного варианта исполнения – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

6.2 Пример комплекта поставки для марли в рулоне:

- Исполнение 1 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м² в рулоне шириной 90 см и длиной 1000 м – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

6.3 Пример комплекта поставки для марли в куске:

- Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в куске шириной 45 см и длиной 3 м – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

6.4 Номенклатурный перечень вариантов исполнения марли:

1. Исполнение 1 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 13)
2. Исполнение 2 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 13)
3. Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 15)
4. Исполнение 4 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 15)
5. Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 17)
6. Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 17)
7. Исполнение 7 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в рулоне шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 50 м 100 м, 250 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 3000 м (арт. NFT 19)
8. Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в куске шириной 45 см, 80 см, 84 см, 88 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см, 150 см, 200 см и длиной 3 м, 5 м, 7 м, 10 м, 20 м, 25 м, 50 м, 100 м, 250 м (арт. NFT 19)

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование может проводиться любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующим на транспорте каждого вида правилами, утверждёнными в установленном порядке.

7.2 Транспортирование должно производиться при температуре от +50°C до –50°C и относительной влажности воздуха до 100% при +25°C.

7.3 Марля должна храниться в групповой или транспортной упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении вдали от источников тепла при температуре от +40°C до –50°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и значительных колебаний температуры во время хранения.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Использованная марля, согласно СанПиН 2.1.3684–21, относится к классу Б.

8.2 Марлю, неиспользованную по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, утилизируют как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы) в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1 Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

10. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

10.1 Срок службы неиспользованного по назначению изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения – 5 лет с даты изготовления. Критерием предельного состояния изделия считается невозможность его использования.

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1 Марля должна быть безопасна при соблюдении правил и норм инструкции по применению.

11.2 Марля не должна оказывать вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

11.3 Марля должна быть нетоксичной и отвечать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения, не вызывать при контакте с кожей местно-раздражающих и аллергических эффектов.

11.4 Показатели санитарно-гигиенических свойств марли должны удовлетворять нормам ГОСТ Р 52770, серии стандартов ГОСТ Р ИСО 10993 и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 18.

11.5 Производство марли не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсибилизирующего воздействия на человека.

11.6 Изделие не является стерильным и стерилизации не подлежит.

12. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего технического файла при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.


12.2 Гарантийный срок годности – 5 лет с даты изготовления.

12.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.


12.4 Материал с истекшим сроком годности не подлежит применению и должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ А


Фотографические изображения

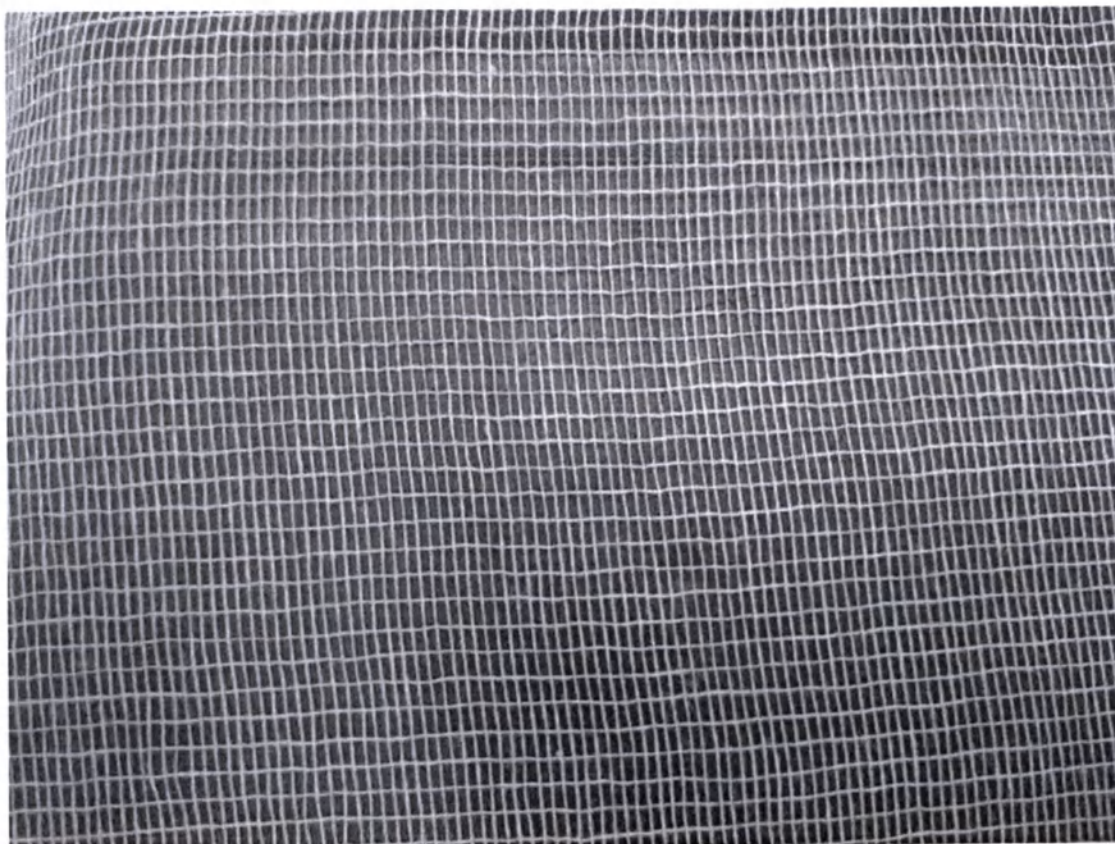


Артикул NFT 13 с поверхностной плотностью 24 г/м²

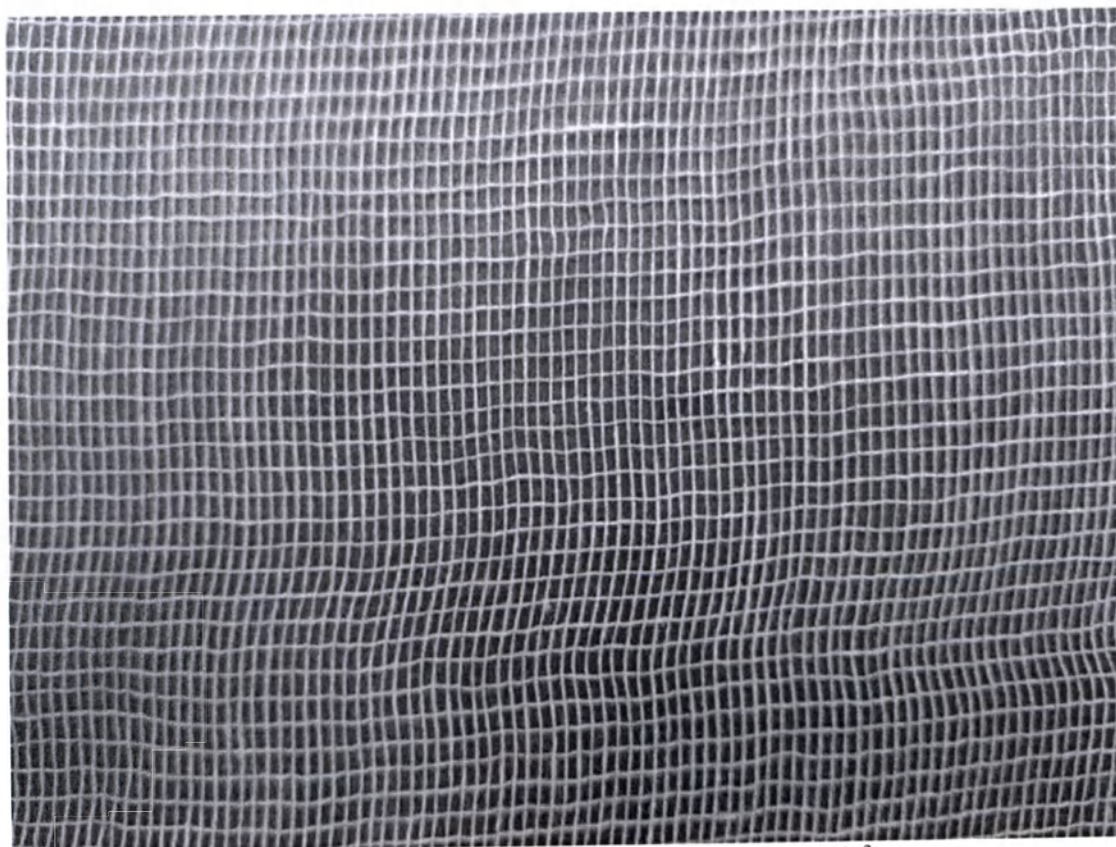


Артикул NFT15 с поверхностной плотностью 28 г/м²

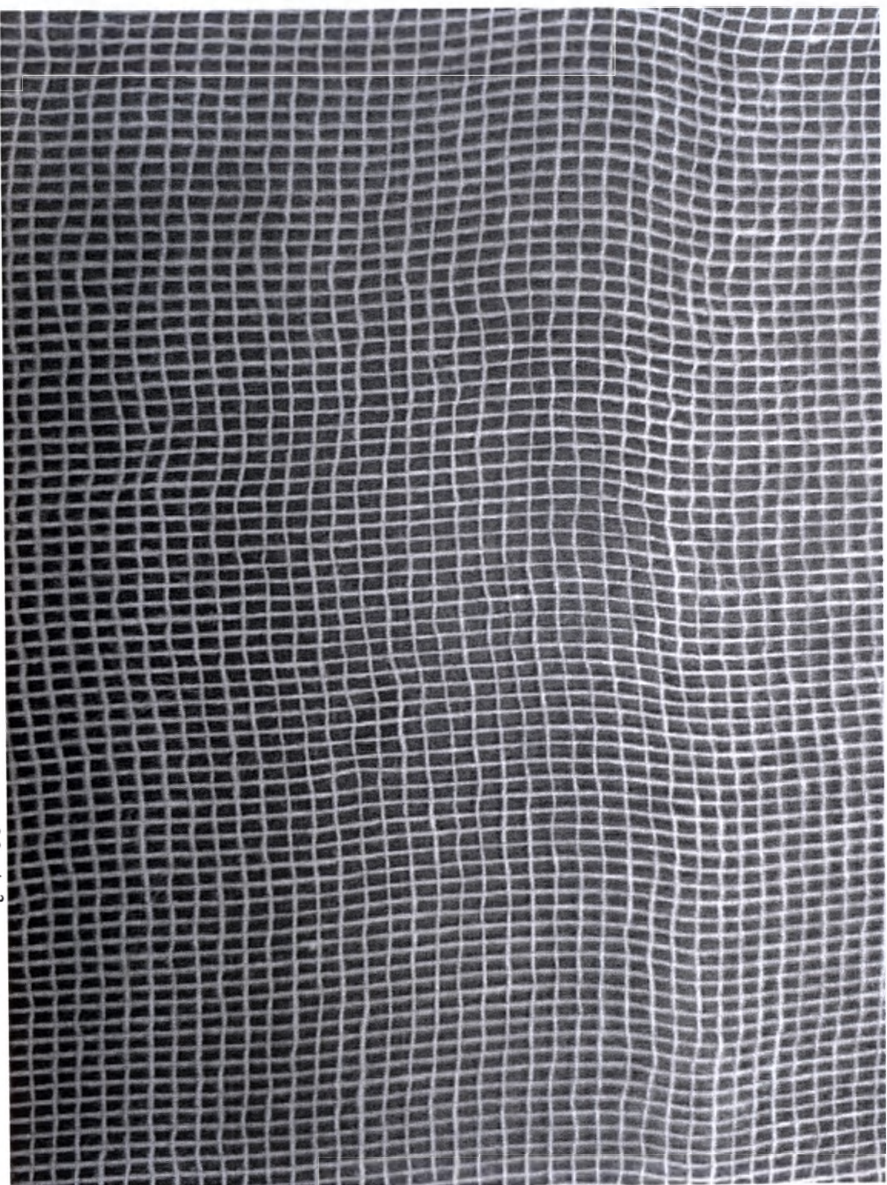


Артикул NFT17 с поверхностной плотностью 30 г/м²

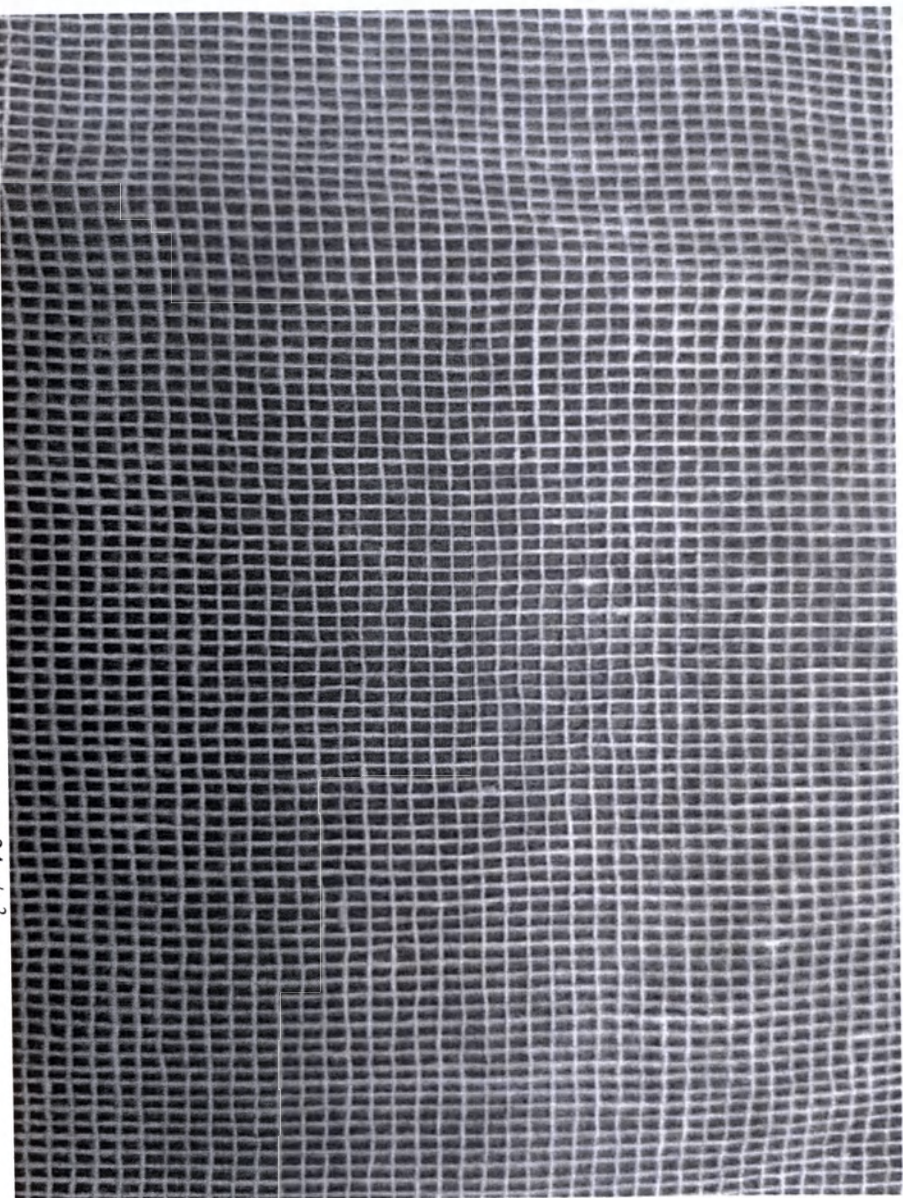


Артикул NFT 19 с поверхностной плотностью 34 г/м²

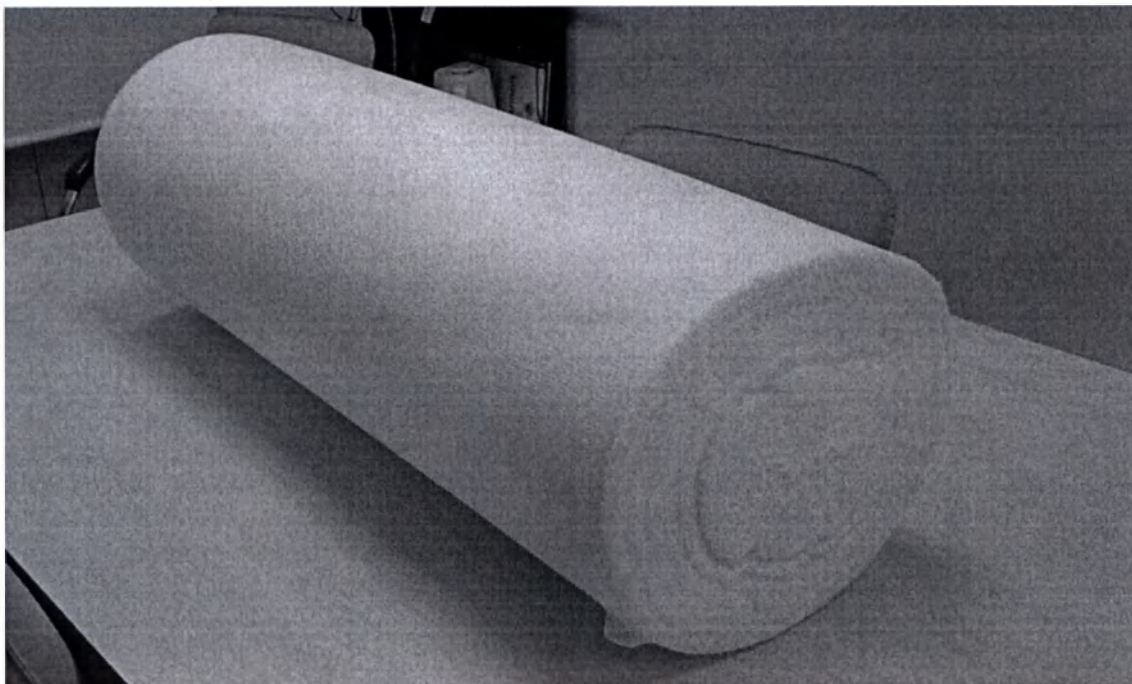


Исполнение 1 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 13)

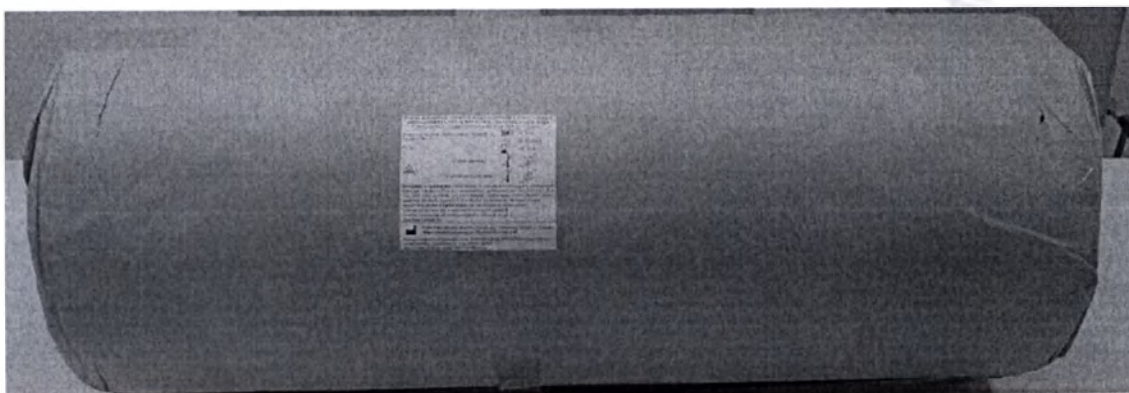


Исполнение 1 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 13) в потребительской упаковке

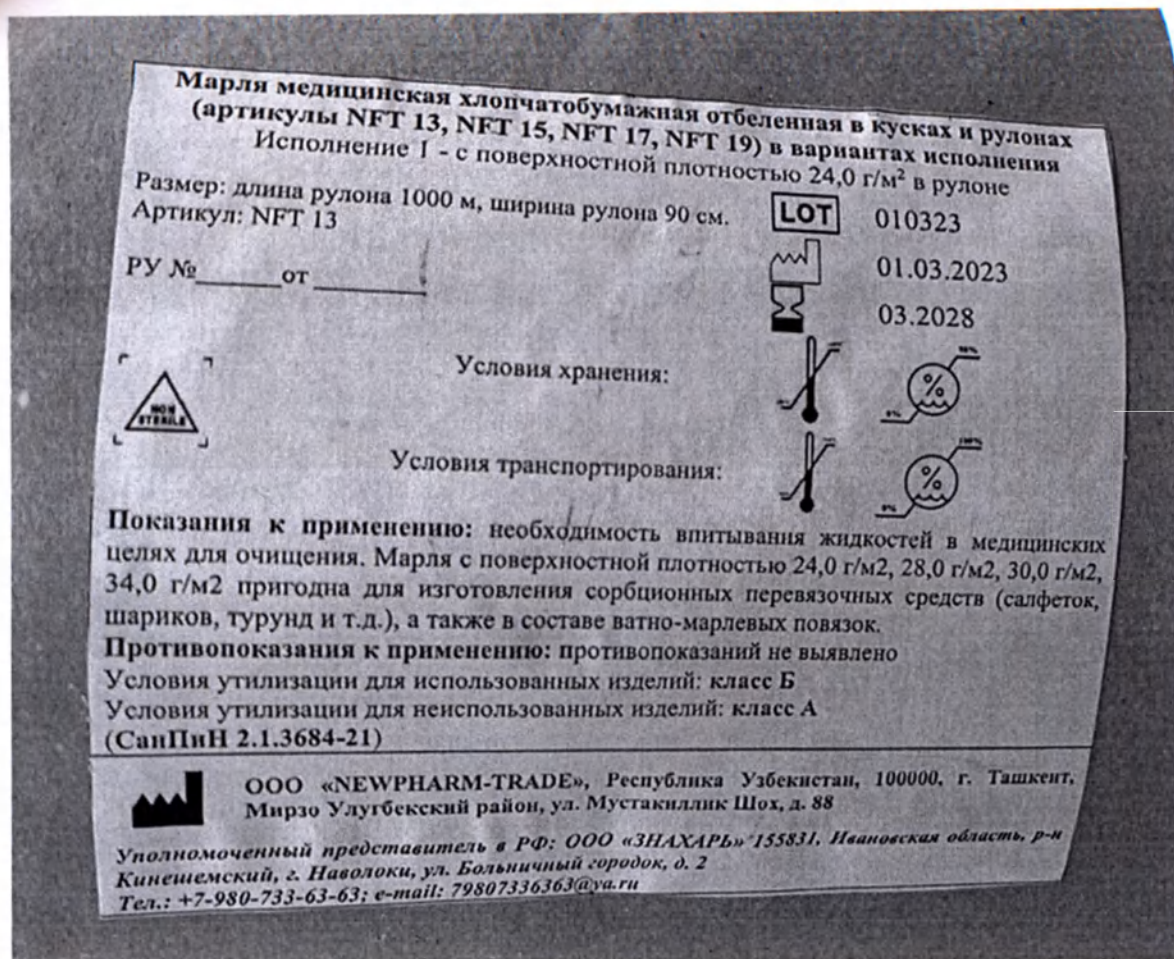


Изображение маркировки потребительской упаковки Исполнение 1 - с поверхностной плотностью 24,0 г/м² в рулоне

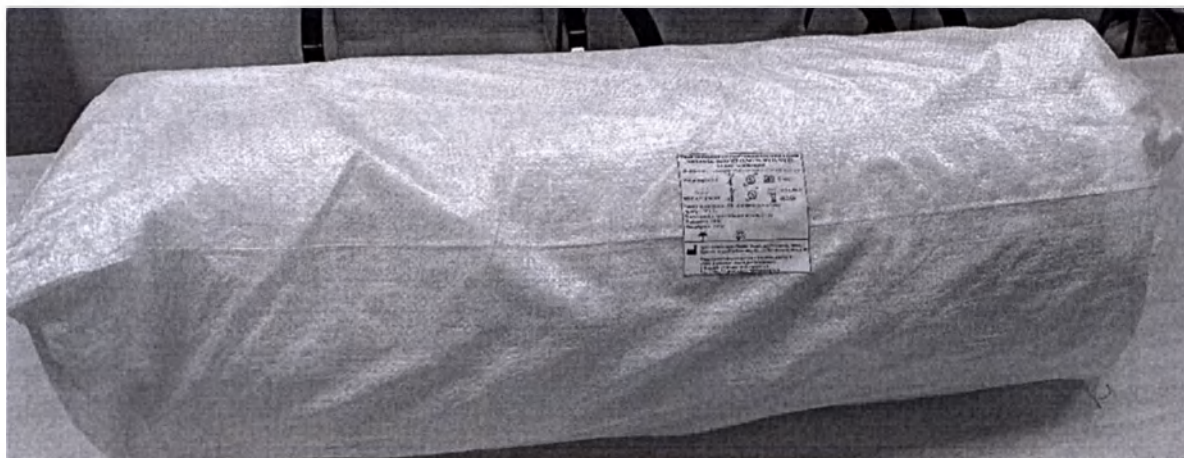


Исполнение 1 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 13) в транспортной упаковке

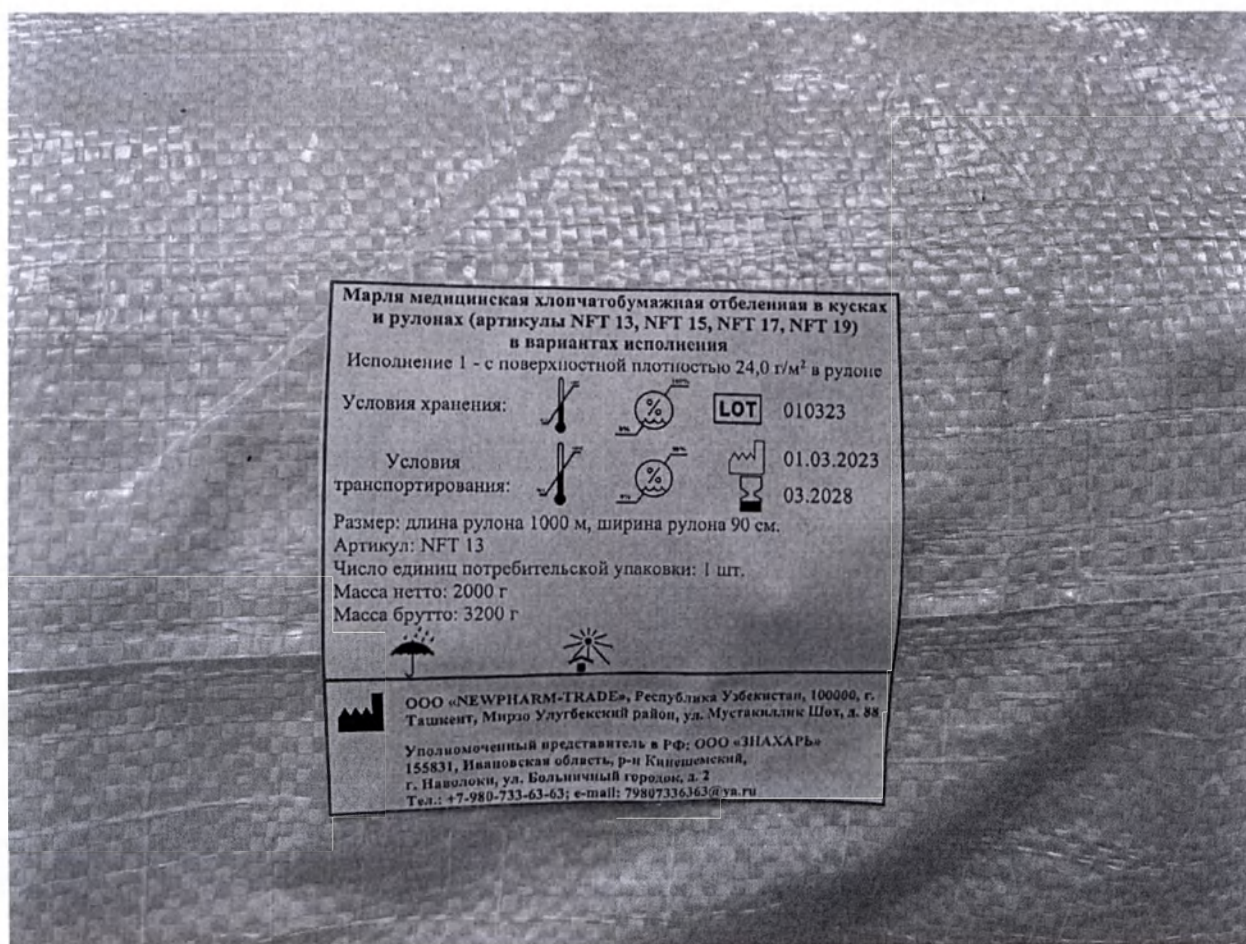


Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 1 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне

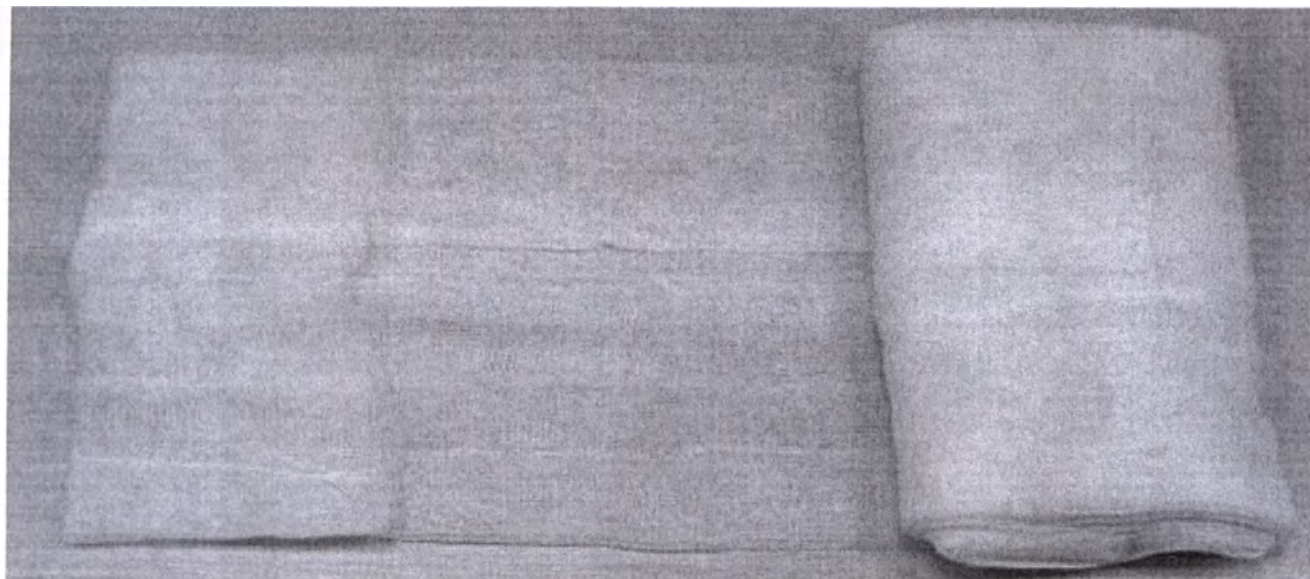


Исполнение 2 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 13)

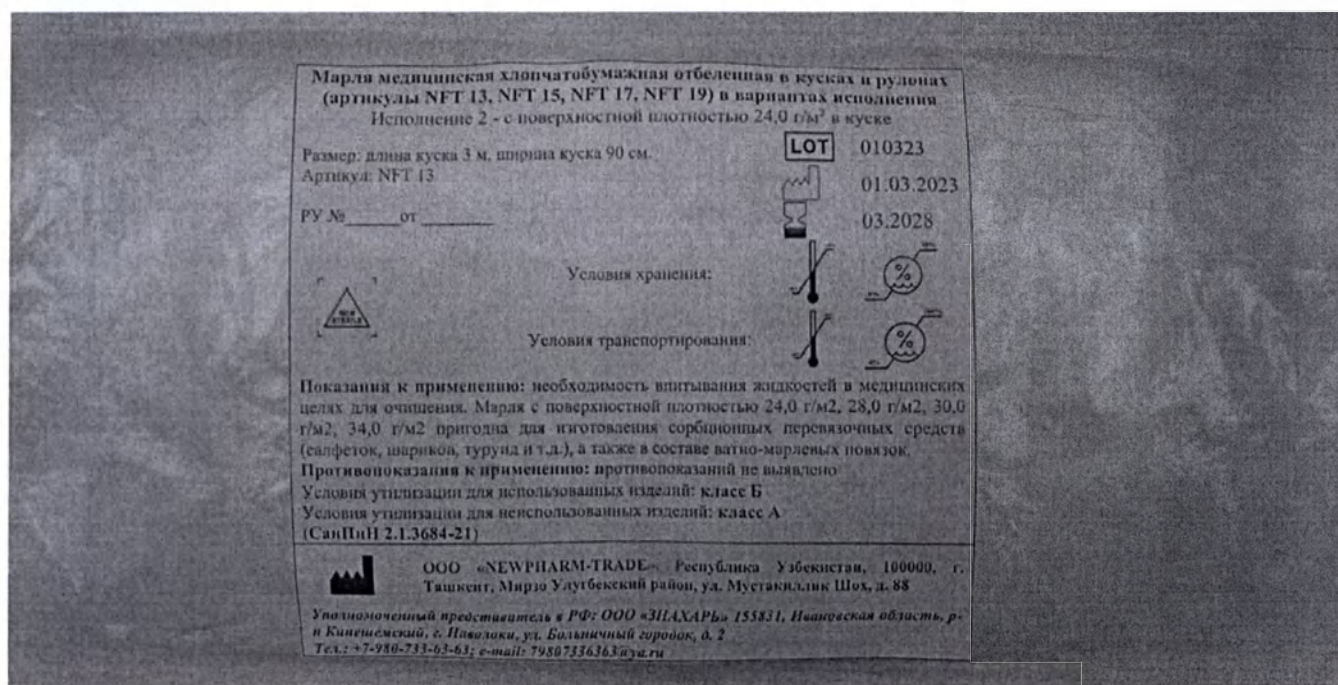


Исполнение 2 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 13) в потребительской упаковке

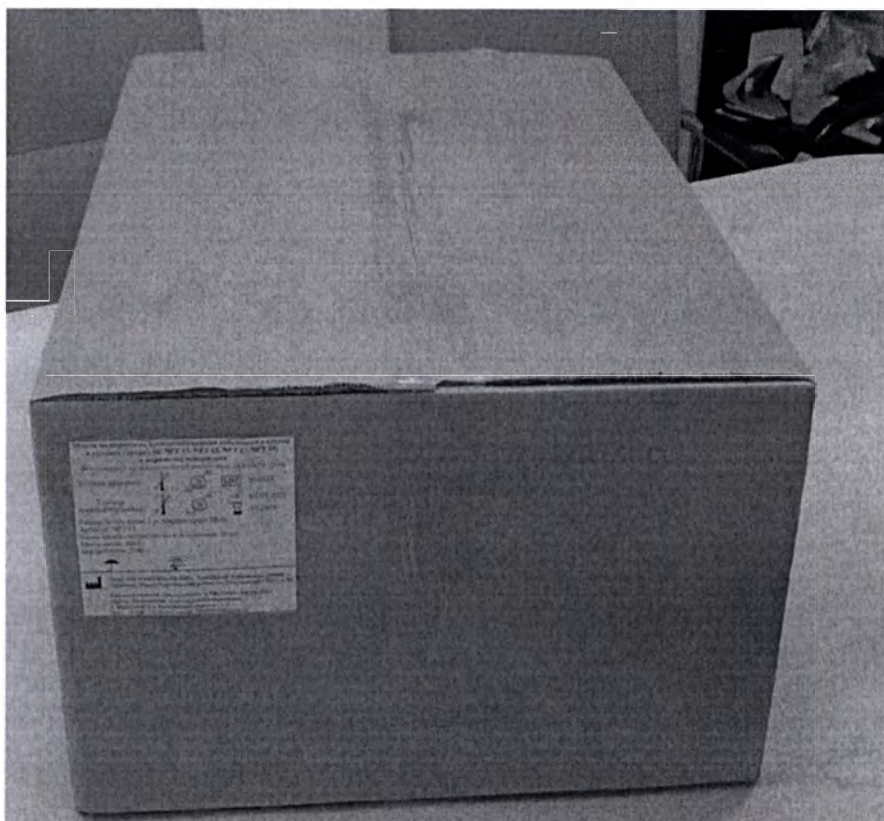


Исполнение 2 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 13) в транспортной упаковке

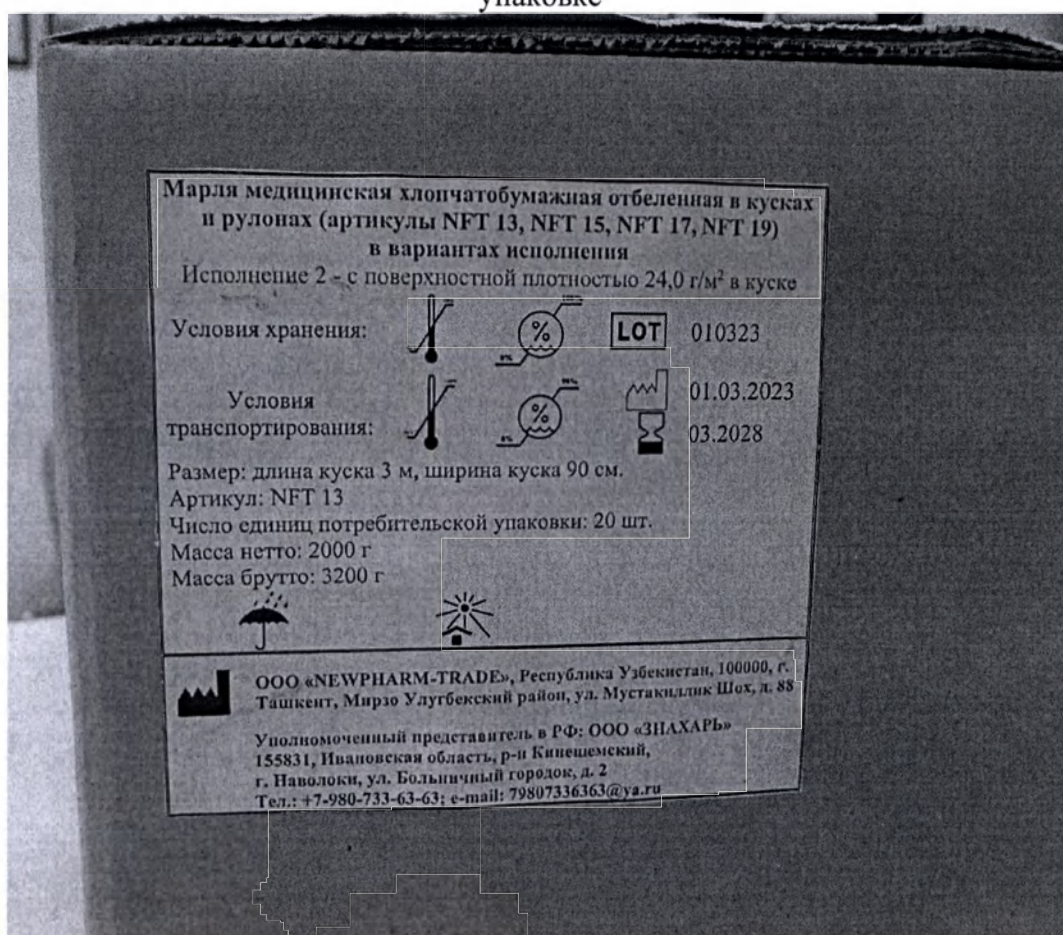

Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 2 - с поверхностной плотностью $24,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 13)

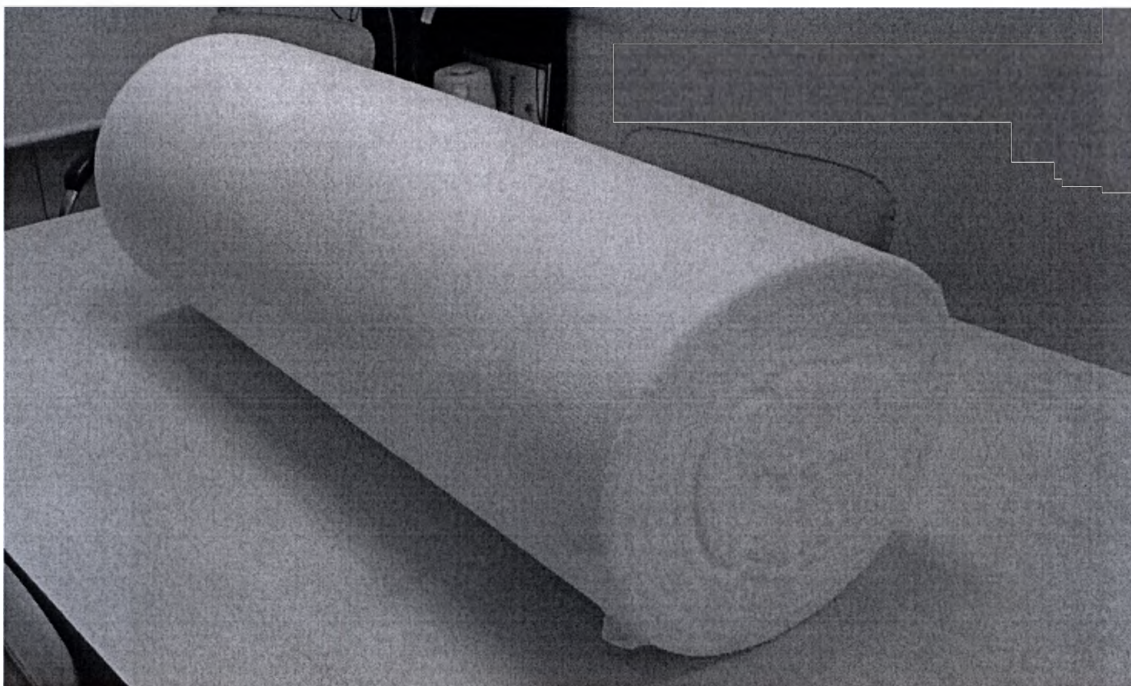

Исполнение 3 - с поверхностной плотностью $28,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 15)

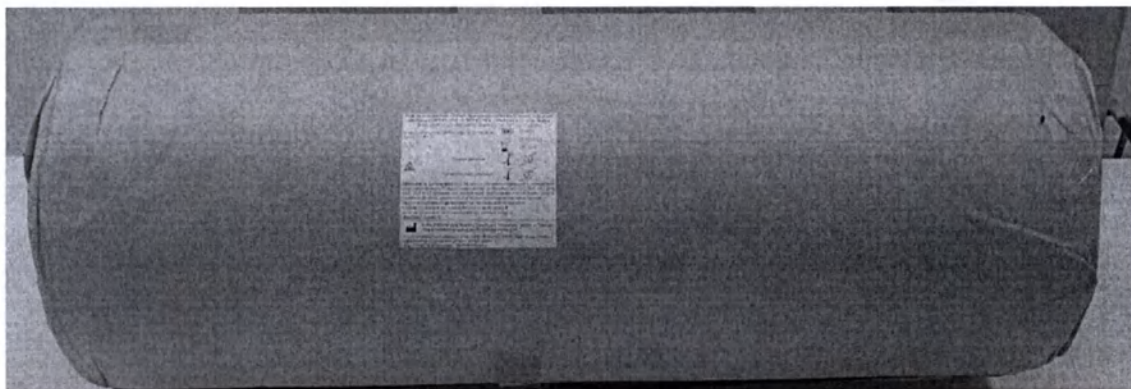

Исполнение 3 - с поверхностной плотностью $28,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 15) в потребительской упаковке

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках и рулонах
(артикулы NFT 13, NFT 15, NFT 17, NFT 19) в вариантах исполнения
Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в рулоне

Размер: длина рулона 1000 м, ширина рулона 90 см.
Артикул: NFT 15

РУ № _____ от _____

Условия хранения:

Условия транспортирования:

Показания к применению: необходимость впитывания жидкостей в медицинских целях для очищения. Марля с поверхностной плотностью 24,0 г/м², 28,0 г/м², 30,0 г/м², 34,0 г/м² пригодна для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), а также в составе ватно-марлевых повязок.

Противопоказания к применению: противопоказаний не выявлено.


Условия утилизации для использованных изделий: класс Б

Условия утилизации для неиспользованных изделий: класс А
(СанПиН 2.1.3684-21)


ООО «NEWPHARM-TRADE», Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент,
Мирзо Улугбекский район, ул. Мустакиллик Шох, д. 88

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ЗНАХАРЬ» 155831, Ивановская область, р-н Кинешемский, г. Наволоки, ул. Больничный городок, д. 2
Тел.: +7-980-733-63-63; e-mail: 79807336363@ya.ru


Изображение маркировки потребительской упаковки Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 15)

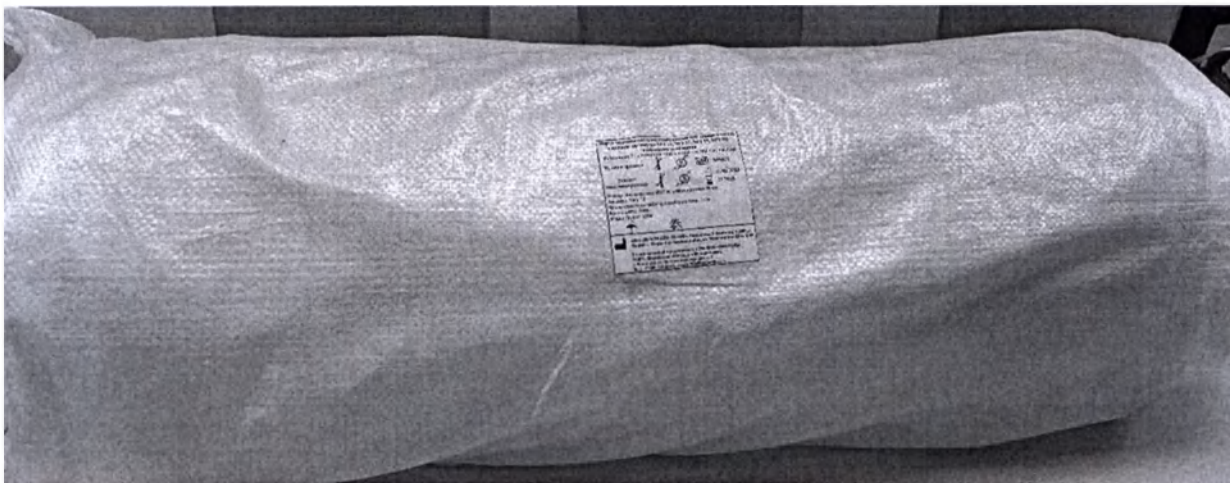


Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 15) в транспортной упаковке

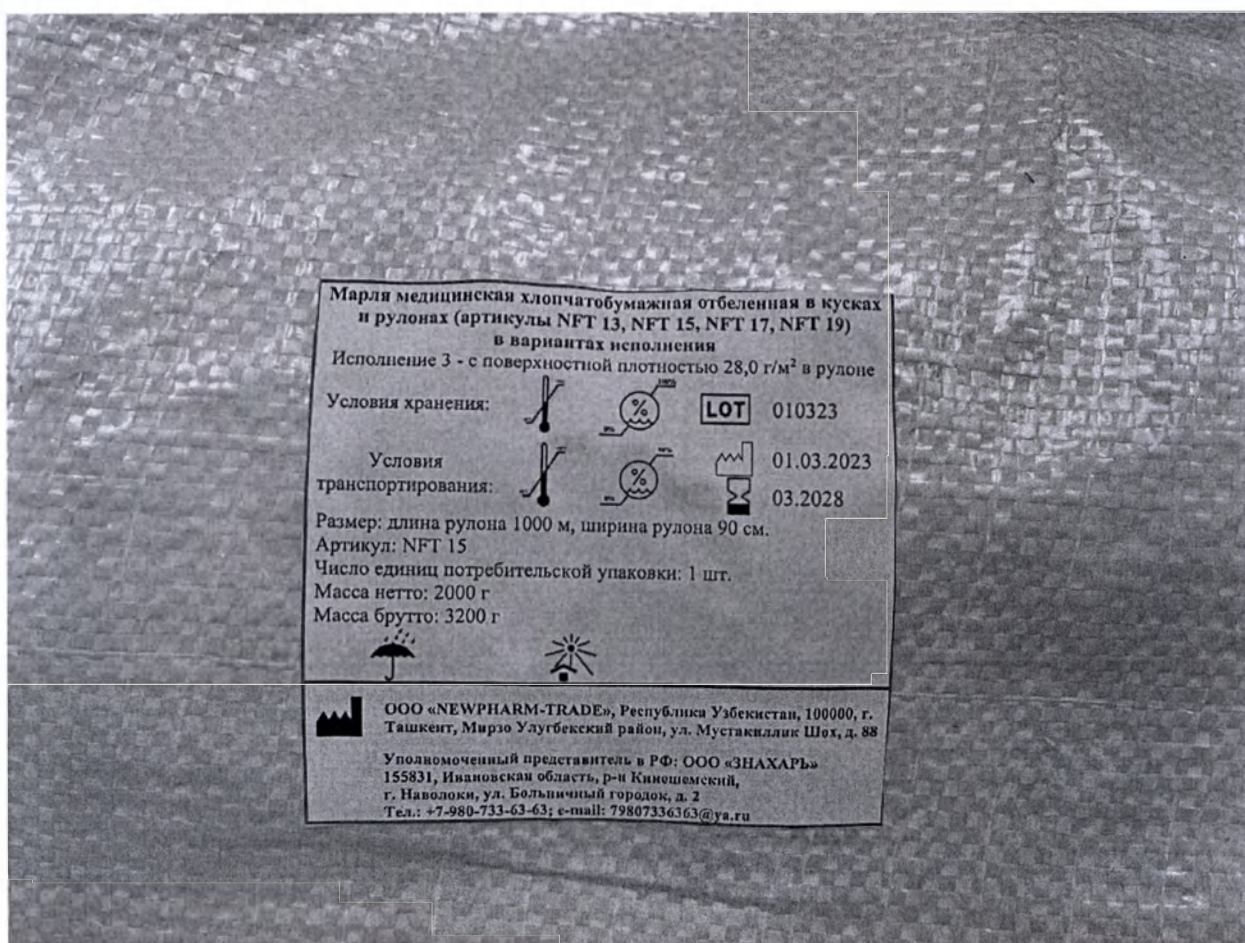

Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 3 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 15)

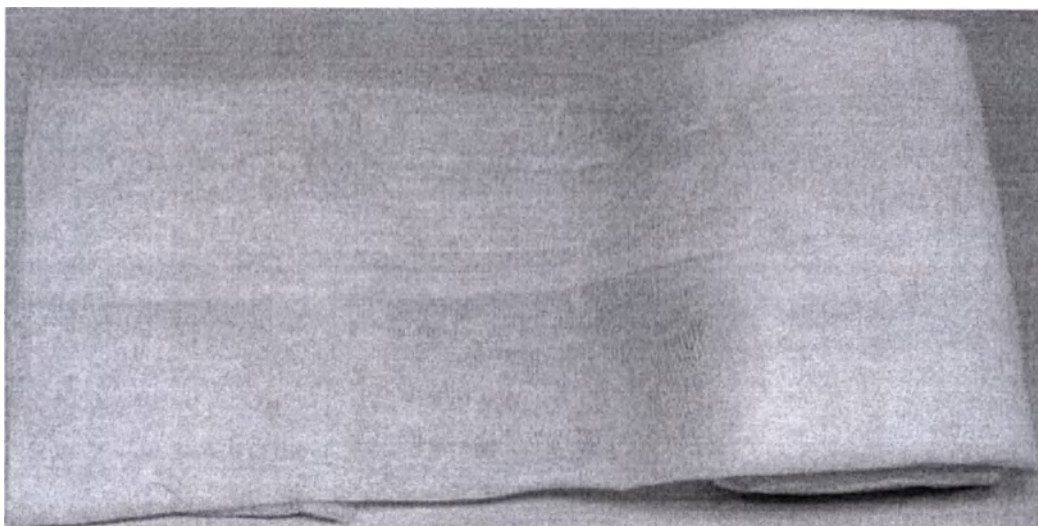


Исполнение 4 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в куске (арт. NFT 15)

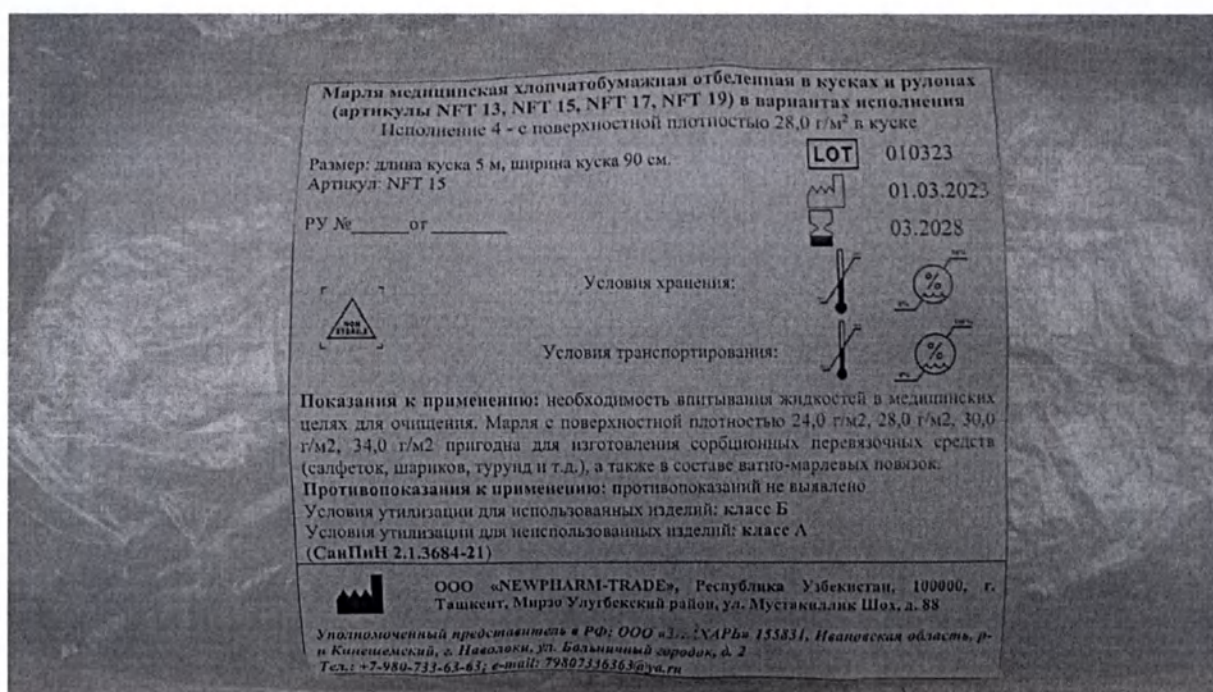


Исполнение 4 - с поверхностной плотностью 28,0 г/м² в куске (арт. NFT 15) в потребительской упаковке




Исполнение 4 - с поверхностной плотностью $28,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 15) в транспортной упаковке

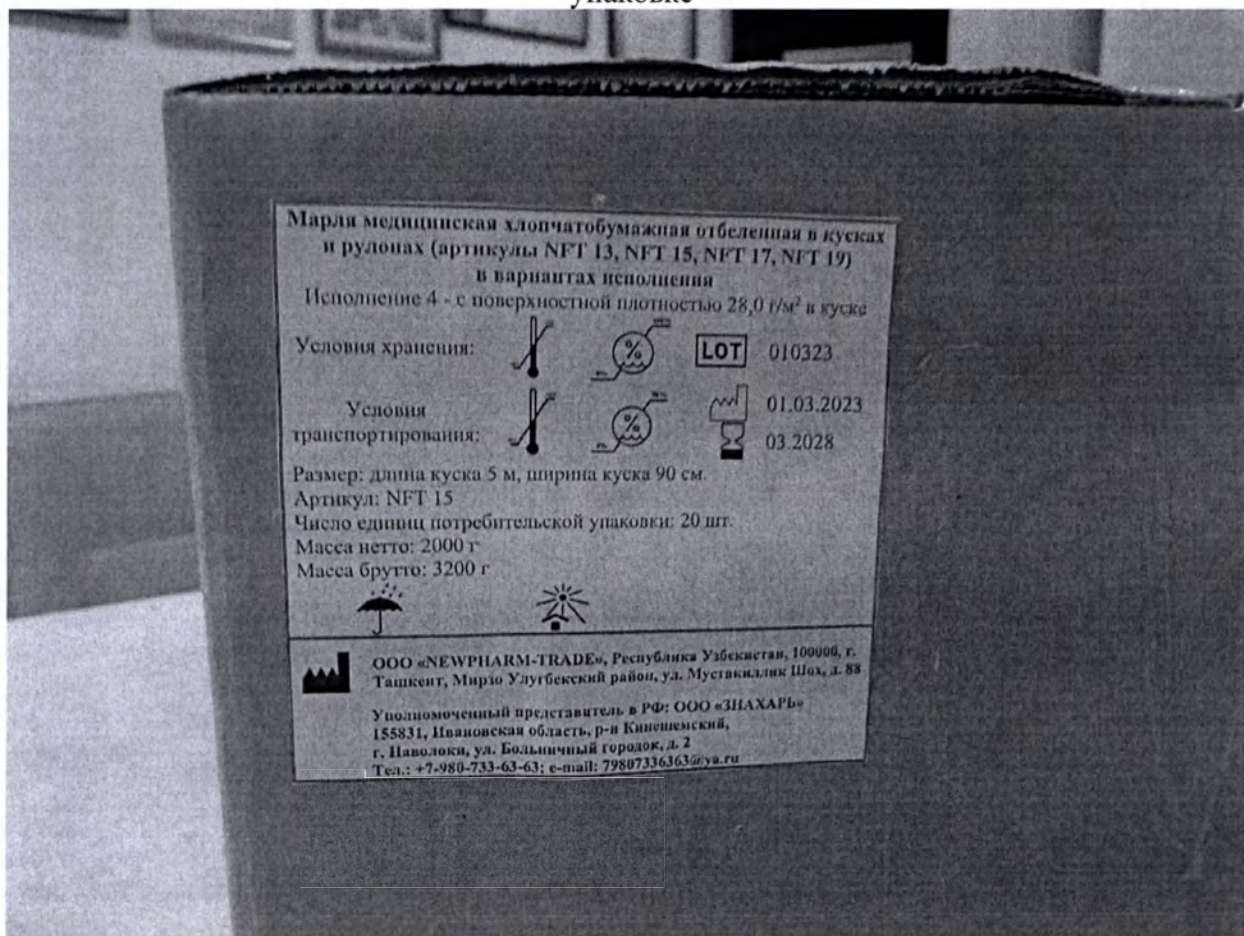


Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 4 - с поверхностной плотностью $28,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 15)

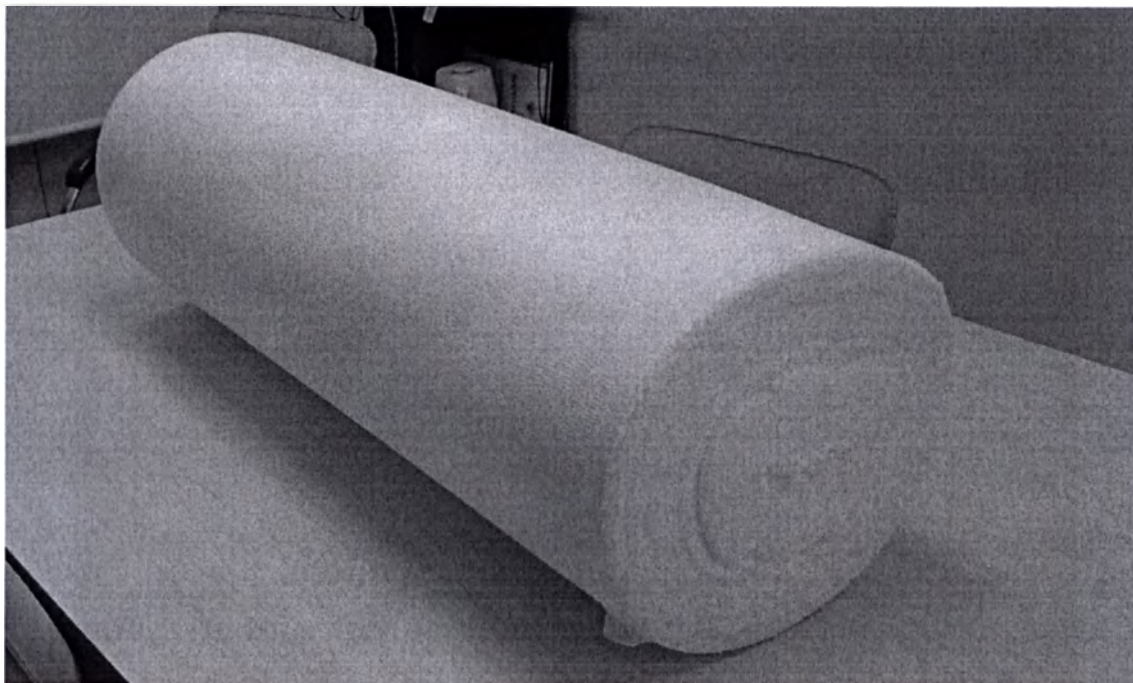


Исполнение 5 - с поверхностной плотностью $30,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 17)

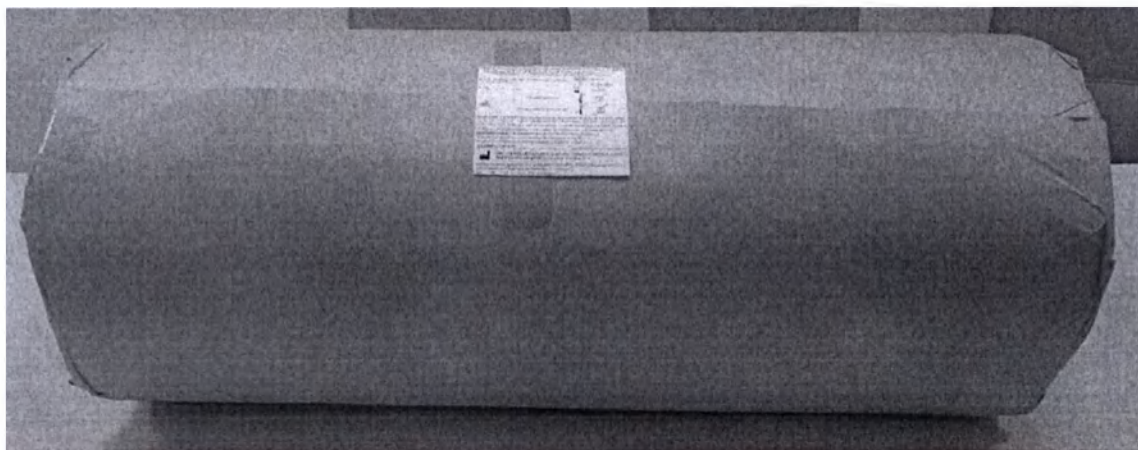

Исполнение 5 - с поверхностной плотностью $30,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 17) в потребительской упаковке

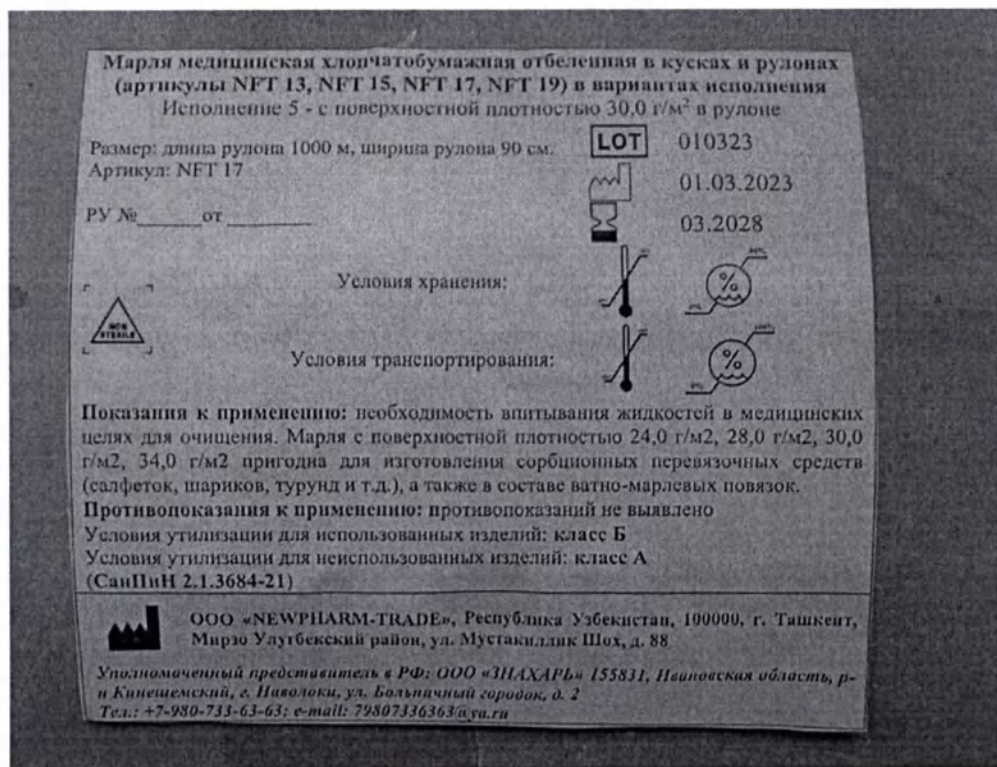


Изображение маркировки потребительской упаковки Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 17)

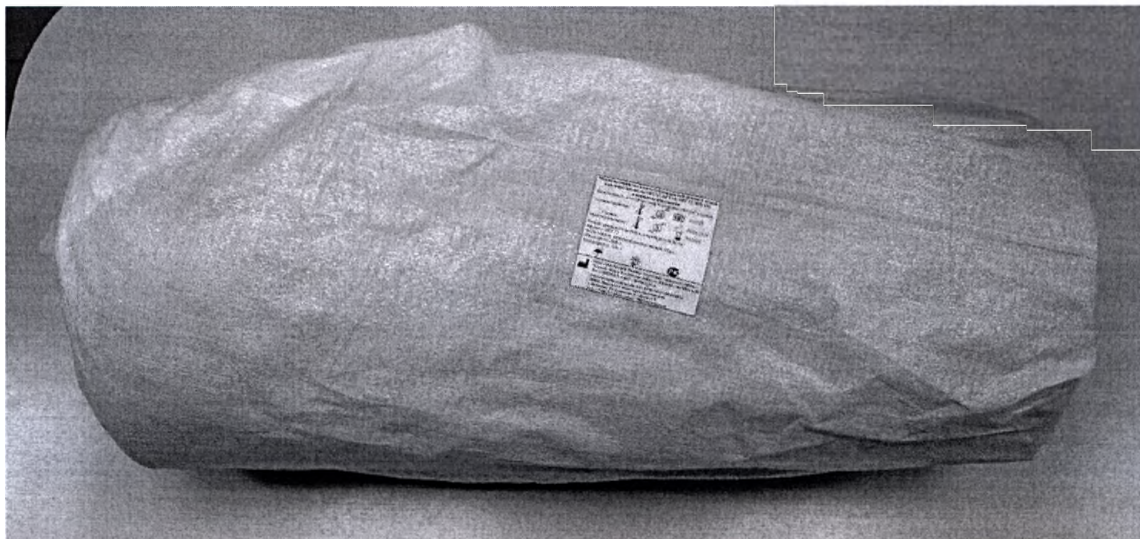


Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 17) в транспортной упаковке

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках и рулонах (артикулы NFT 13, NFT 15, NFT 17, NFT 19) в вариантах исполнения

Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в рулоне

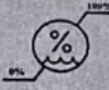Условия хранения:   **LOT** 010323

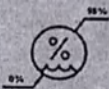Условия транспортирования:    01.03.2023
03.2028


Размер: длина рулона 1000 м, ширина рулона 90 см.
Артикул: NFT 17
Число единиц потребительской упаковки: 1 шт.
Масса нетто: 2000 г
Масса брутто: 3200 г


 **ООО «NEWPHARM-TRADE»**, Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Мустакиллик Шох, д. 88

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ЗНАХАРЬ»
155831, Ивановская область, р-н Кинешемский,
г. Наволоки, ул. Больничный городок, д. 2
Тел.: +7-980-733-63-63; e-mail: 79807336363@ya.ru


Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 5 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 17)

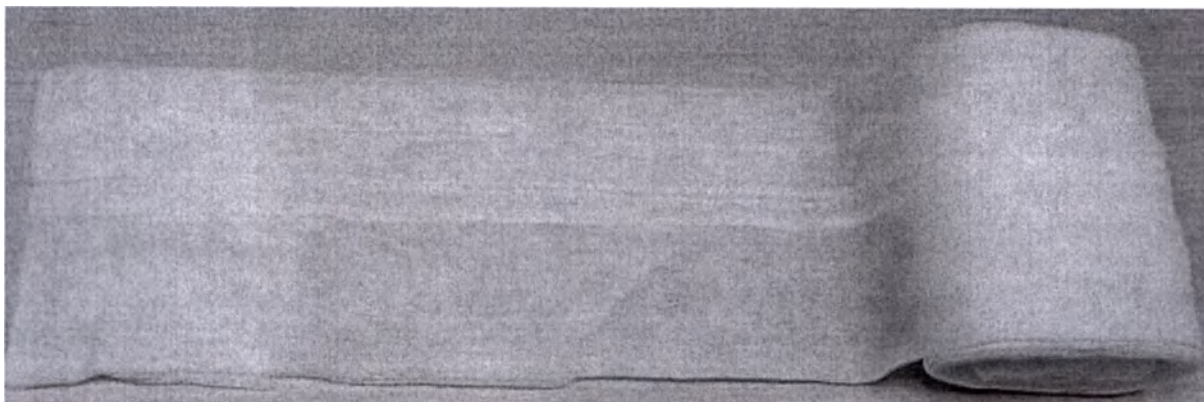


Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в куске (арт. NFT 17)

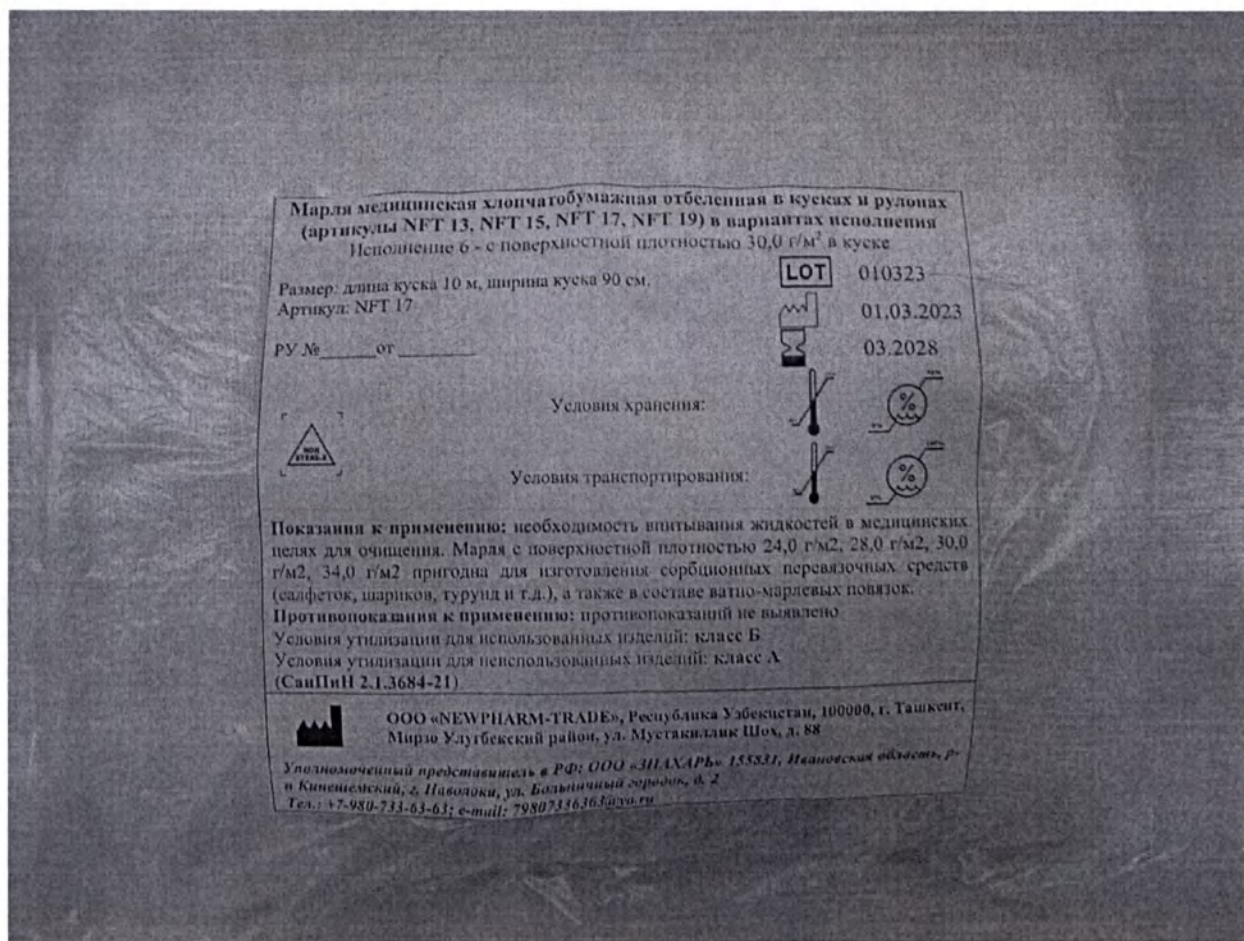


Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в куске (арт. NFT 17) в потребительской упаковке

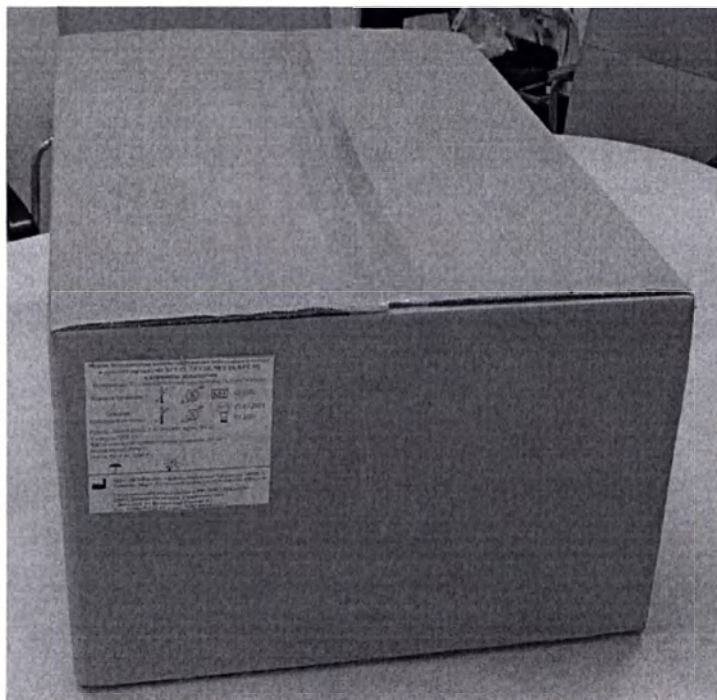


Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в куске (арт. NFT 17) в транспортной упаковке

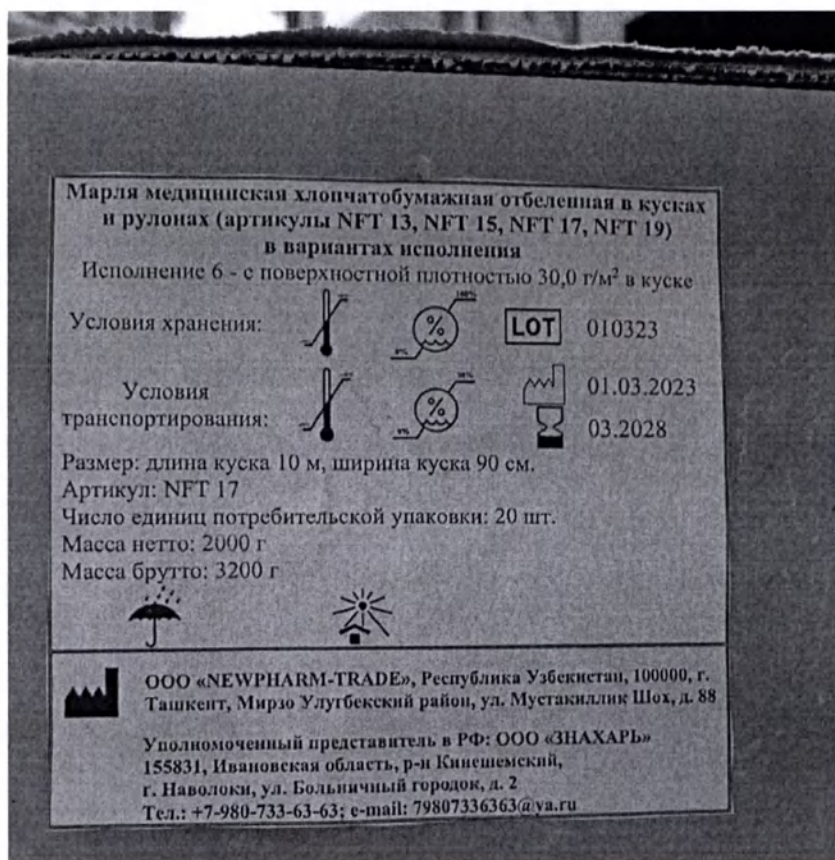


Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 6 - с поверхностной плотностью 30,0 г/м² в куске (арт. NFT 17)

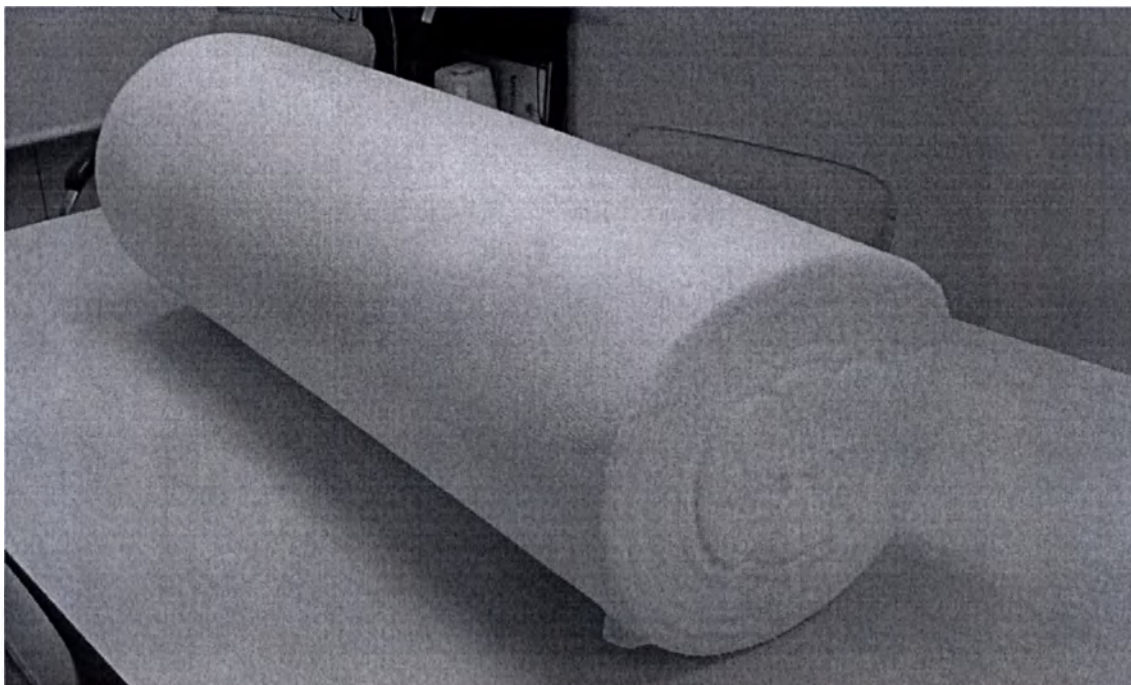


Исполнение 7 - с поверхностной плотностью $34,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 19)

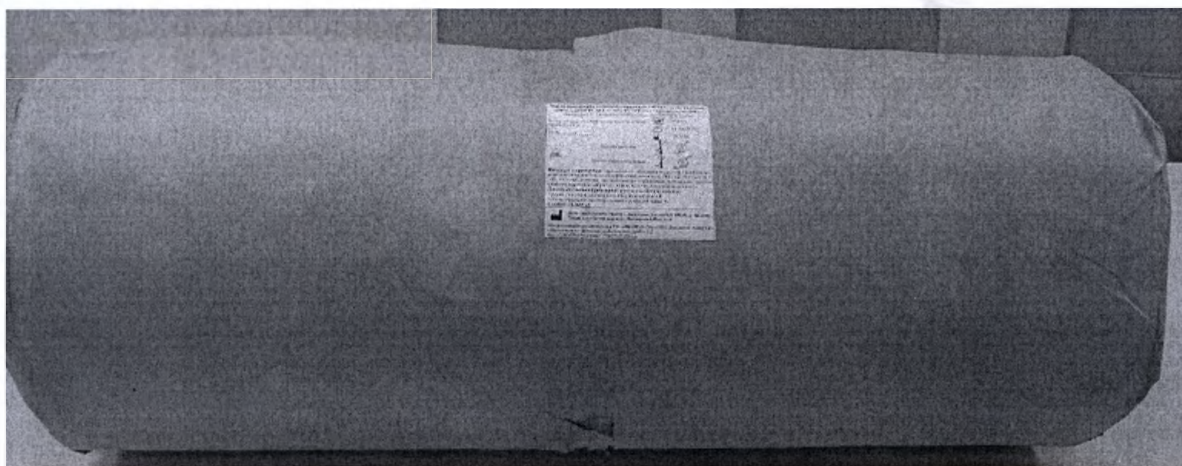


Исполнение 7 - с поверхностной плотностью $34,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 19) в потребительской упаковке

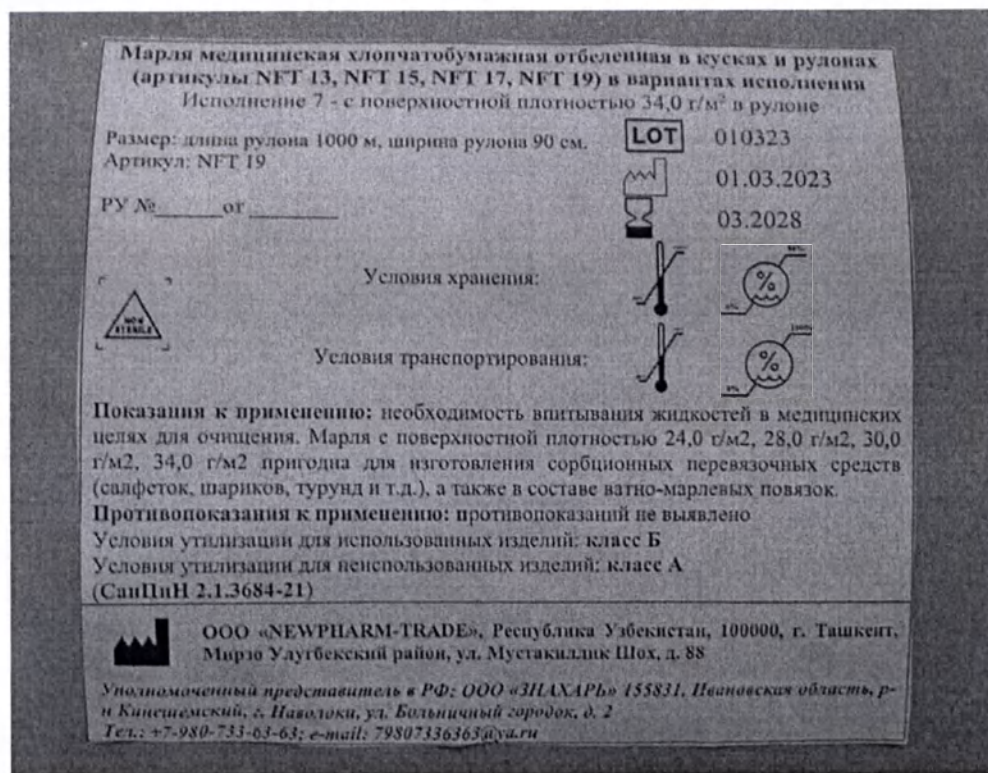


Изображение маркировки потребительской упаковки Исполнение 7 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в рулоне (арт. NFT 19)

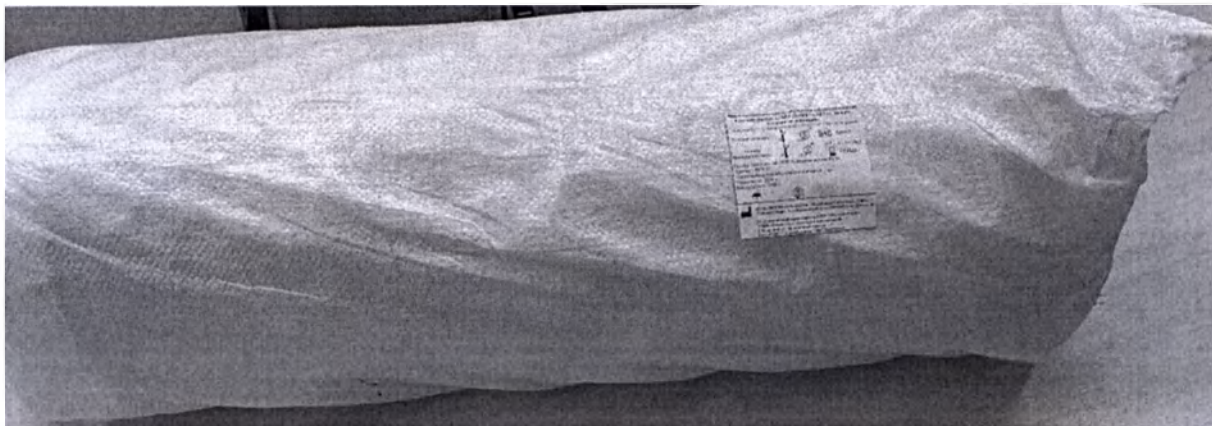

Исполнение 7 - с поверхностной плотностью $34,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 19) в транспортной упаковке

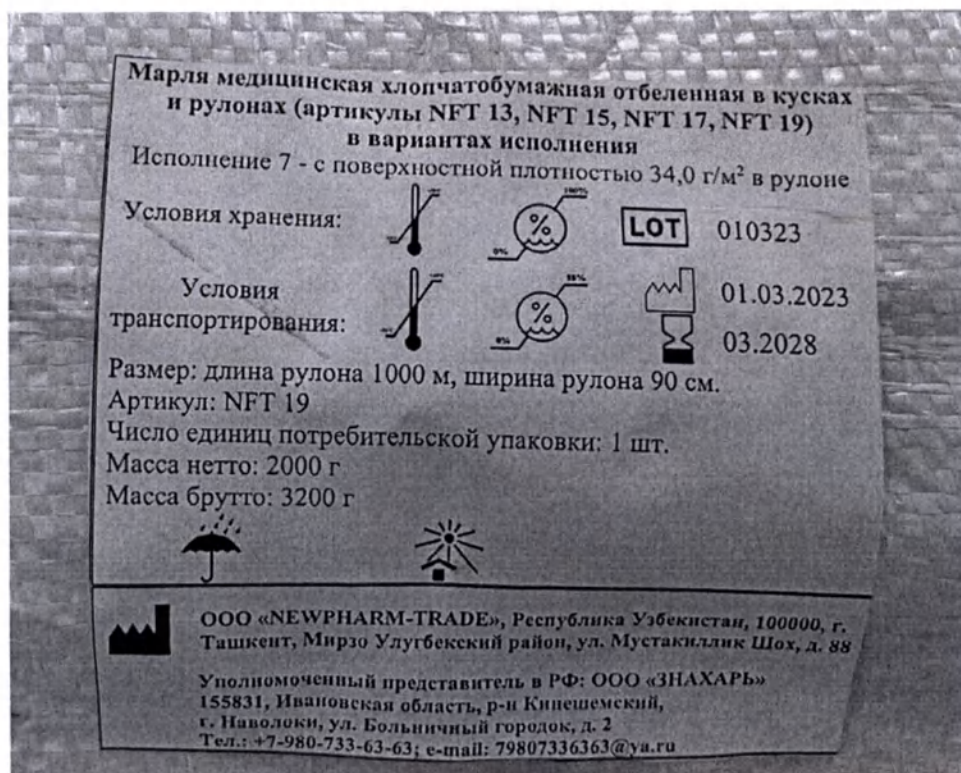


Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 7 - с поверхностной плотностью $34,0 \text{ г/м}^2$ в рулоне (арт. NFT 19)

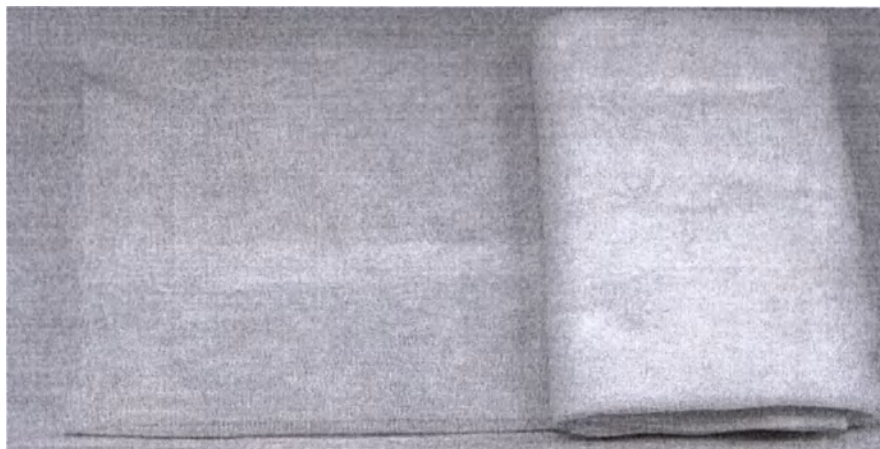


Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в куске (арт. NFT 19)

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в кусках и рулонах (артикулы NFT 13, NFT 15, NFT 17, NFT 19) в вариантах исполнения Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в куске	
Размер: длина куска 3 м, ширина куска 90 см. Артикул: NFT 19 РУ № _____ от _____	LOT 010323 01.03.2023 03.2028
Условия хранения: Условия транспортирования:	Icons for storage and transport conditions.
Показания к применению: необходимость впитывания жидкостей в медицинских целях для очищения. Марля с поверхностной плотностью 24,0 г/м², 28,0 г/м², 30,0 г/м², 34,0 г/м² пригодна для изготовления сорбционных перевязочных средств (салфеток, шариков, турунд и т.д.), а также в составе ватно-марлевых повязок. Противопоказания к применению: противопоказаний не выявлено. Условия утилизации для использованных изделий: класс Б. Условия утилизации для неиспользованных изделий: класс А (СанПиН 2.1.3684-21).	
ООО «NEWPHARM-TRADE», Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо Улутбекский район, ул. Мустакиллик Шох, д. 88 Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ЗНАХАРЬ» 155831, Новгородская область, р-н Кинешемский, д. Павлово, ул. Больничный городок, д. 2 Тел.: +7-980-733-63-63; e-mail: 79807336363@yandex.ru	

Исполнение 8 - с поверхностной плотностью 34,0 г/м² в куске (арт. NFT 19) в потребительской упаковке

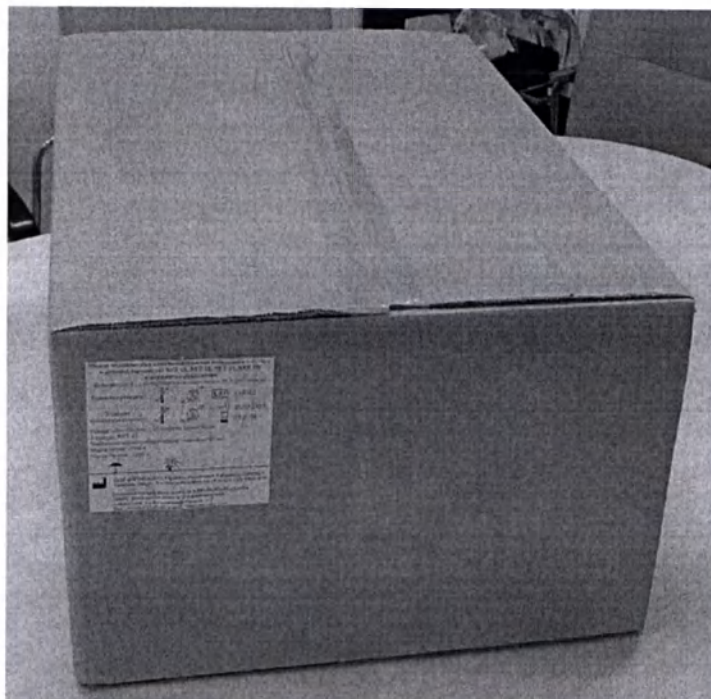

Исполнение 8 - с поверхностной плотностью $34,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 19) в транспортной упаковке

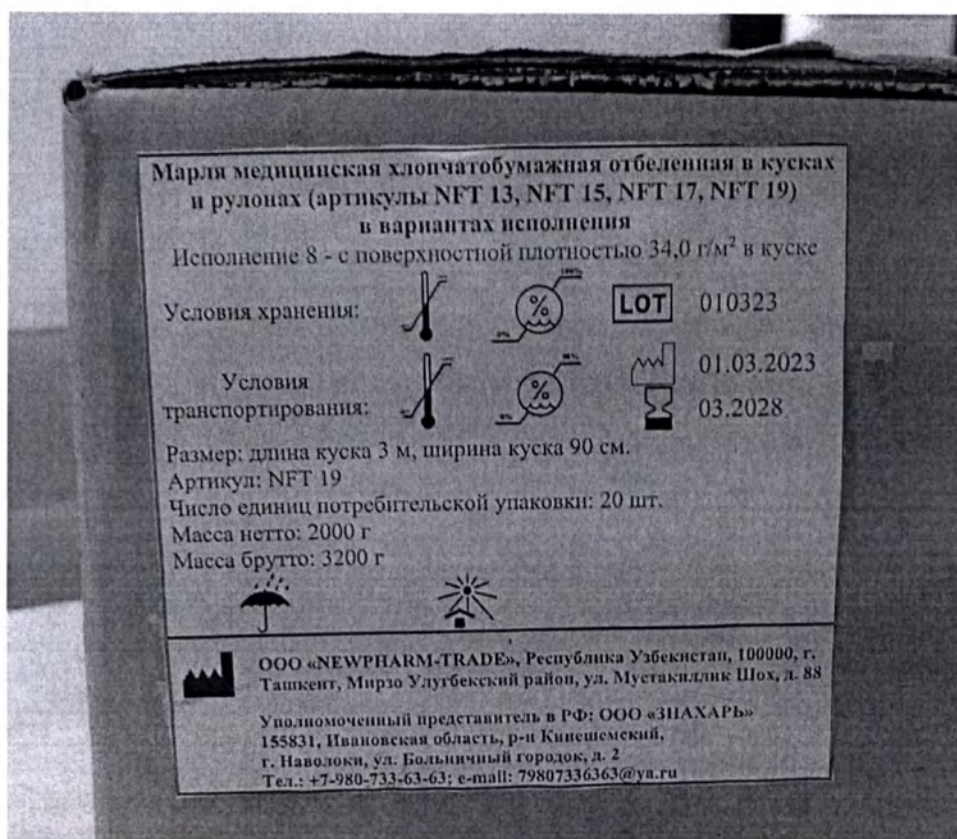

Изображение маркировки транспортной упаковки Исполнение 8 - с поверхностной плотностью $34,0 \text{ г/м}^2$ в куске (арт. NFT 19)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень применяемых стандартов

ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ 3812-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса
ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 3816-81	Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 8273-75	Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9412-2021	Марля медицинская. Общие технические условия
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 18054-72	Материалы текстильные. Метод определения белизны
ГОСТ 25617-2014	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ Р 2.601-2019	Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 32522-2013	Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
СанПиН 2.1.3684-21	«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010г. №163)
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 21241-89	Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 8.423-81	Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 21239-93	Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 58144-2018	Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 4233-77	Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия
ГОСТ 1277-75	Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия
ГОСТ 4461-77	Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 4108-72	Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия
ГОСТ 4145-74	Реактивы. Калий серноокислый. Технические условия
ГОСТ 3118-77	Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760-79	Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 3773-72	Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия
ГОСТ 5712-78	Реактивы. Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия
ГОСТ 4530-76	Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия
ГОСТ 20490-75	Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 4204–77	Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4159–79	Реактивы. Йод. Технические условия
ГОСТ 61–75	Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 4220–75	Реактивы. Калий двуххромовокислый. Технические условия
ГОСТ 28840–90	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
ГОСТ 10197–70	Стойки и штативы для измерительных головок. Технические условия
ГОСТ ISO 14971–2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 г. №299. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №769).

Переведено с узбекского языка

Круглая печать: Республика Узбекистан, город Ташкент. Общество с ограниченной ответственностью «NEWPHARM-TRADE» («НЬЮФАРМ-ТРЕЙД»)

Республика Узбекистан. Город Ташкент.

Перевод выполнен переводчиком Нурматовой Дилнозой Равшанбековной. Паспорт АВ №3433149, выданный 14.03.2016 г. РУВД Алмазарского района города Ташкента.

Перевод данного текста полностью соответствует тексту оригинала, я Нурматова Дилноза Равшанбековна, владелец диплома В № 276814 выданный Национальным Университетом Узбекистана от 19 июня 2006 года, удостоверяю правильность перевода на русский язык текста записей и печати в изложенном документе. Об ответственности - за ложный и неверный перевод предупреждена нотариусом.

Переводчик не несёт ответственности за содержание и достоверность информации в изложенном оригинале документах.

Подпись Нурматова Дилноза Равшанбековна

По вопросам обращаться по телефону: 71 255 01 72 71 255 21 80



На основании статьи 67 «Закона о нотариате» Республики Узбекистан, нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет факты, изложенные в документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным лицом.

Республика Узбекистан.
Город Ташкент. Алмазарский район.
«05» августа. Две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Файзуллаева Камола Тахирджановна, Нотариус Алмазарского района города Ташкента, занимающаяся частной практикой «FAYZULLAYEVA KAMOLA TAXIRDJANOVNA», свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Нурматовой Дилнозы Равшанбековны. Личность, подписавшей документ установлена, дееспособность проверена, т.е. при личном общении с ней её дееспособность сомнений не вызвала.

Зарегистрировано в АИС «Нотариус» за № 202402216013325

Взыскано государственной пошлины: 17 000 сум



НОТАРИУС

Файзуллаева К.Т.



Гербовая печать
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
АЛМАЗАРСКИЙ РАЙОН
НОТАРИУС ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
«ФАЙЗУЛЛАЕВА КАМОЛА ТАХИРДЖАНОВНА»
TN 0161

Перевод с узбекского языка на русский язык

Две гербовые печати нотариуса:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ГОРОД ТАШКЕНТ

АЛМАЗАРСКИЙ РАЙОН

НОТАРИУС, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,

ФАЙЗУЛЛАЕВА КАМОЛА ТАХИРДЖАНОВНА

TN 0161

-----Конец перевода документа-----

Перевод с узбекского языка на русский язык выполнен переводчиком Бурановой Рано Анваровной. Подтверждаю, что выполненный мной перевод является правильным, точным и полным.

Буранова Рано Анваровна

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать пятого ноября две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Дзенс Наталья Анатольевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписи переводчика Бурановой Рано Анваровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 78/80-н/78-2024- 9 - 944

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.



Handwritten signature of Natalya Anatolyevna Dzens.

Н.А. Дзенс



Итого в настоящем документе:

37 () листов

Нотариус

Handwritten signature of Natalya Anatolyevna Dzens.

Н.А. Дзенс

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать пятого ноября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Дзенс Наталья Анатольевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/80-н/78-2024-9-945.

Уплачено за совершение нотариального действия: 540 руб. 00 коп.



Н.А.Дзенс



Итого в настоящем
документе 36 листов
Нотариус: