

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

02907399

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书 CERTIFICATE



号码 No. 251100B0/006580

兹证明：在所附文件上的郑州安图生物工程股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of AUTOBIO DIAGNOSTICS CO.,LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion
of International Trade



授权签字:

Authorized
Signature:

Chen Yao

日期：2025年02月10日

(Date: Feb. 10, 2025)

证明书地址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>



Autobio Diagnostics Co.,Ltd

No. 87 Jingbei Yi Road, National Eco&Tech Development
Area Zhengzhou, China, 450016

Tel: +86-371-67985313 E-mail: info@autobio-diagnostics.com

Website: en.autobio.com.cn

This is to certify that the attached document is true and correct copy of the:

Instruction For Use

PAPP-A CLIA Microparticles

APPROVED BY:

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD., No. 87 Jingbei Yi Road, National Eco & Tech Development Area,
450016 Zhengzhou, People's Republic of China

Name, Surname: Hezi Zhang

Position held: RA Manager of Autobio Diagnostics Co., Ltd.

Signature: _____

Place and Date of issue: 06, February 2025 at Autobio Diagnostics. Co., Ltd.



REF	CMN0502	CMN0505
	100 тестов	50*2 тестов

Набор реагентов для количественного определения ассоциированного с беременностью протеина плазмы А в сыворотке крови человека (PAPP-A CLIA Microparticles (PAPP-A)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Основные графические символы

LOT

код партии



изготовитель

IVD

медицинское изделие для диагностики *in vitro*

REF

номер по каталогу



дата изготовления



биологические риски



хрупкое, обращаться осторожно



не допускать воздействия влаги



использовать до



содержимого достаточно для проведения <n> тестов



температурный диапазон



обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде



указывает правильное вертикальное положение



раздражающее вещество. Представляет опасность при попадании внутрь, на кожу или при вдыхании



не допускать воздействия солнечного света



AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No.87 Jingbei Yi Road
National Eco & Tech Development Area
450016 Zhengzhou
People's Republic of China
(Китайская Народная Республика)

Наименование медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения ассоциированного с беременностью протеина плазмы А в сыворотке крови человека (PAPP-A CLIA Microparticles (PAPP-A)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo.

Варианты исполнения:

I. Фасовка 50*2 тестов:

1. Основной реагент PAPP-A:

- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 1,2 мл – 2 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 2 шт.
- Разбавитель образца (Sample Diluent), 3,0 мл – 2 шт.

2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.

3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.

4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.

5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.

6. Инструкция по применению – 1 шт.

7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.

8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

II. Фасовка 100 тестов:

1. Основной реагент PAPP-A:

- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 1 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 11,0 мл – 1 шт.
- Разбавитель образца (Sample Diluent), 5,5 мл – 1 шт.

2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.

3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.

4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.

5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.

6. Инструкция по применению – 1 шт.

7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.

8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Назначение

Набор реагентов PAPP-A CLIA Microparticles предназначен для количественного определения ассоциированного с беременностью плазменного белка А (PAPP-A) в сыворотке крови человека с помощью анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo, применяется в качестве вспомогательного средства в диагностике хромосомных aberrаций плода в комбинации с другими исследованиями.

Функциональное назначение и область применения

Вспомогательное средство для клинической лабораторной диагностики.

Показания и противопоказания

Медицинское изделие должно применяться в соответствии с его назначением.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия. Конкретизация профессионального уровня потенциальных пользователей

Медицинское изделие предназначено для использования в различных клиничко-лабораторных условиях, включая без ограничения больницы и лаборатории, для профессионального применения. Персонал должен иметь необходимую квалификацию для выполнения диагностических исследований *in vitro*: использование медицинского изделия возможно врачом клинической лабораторной диагностики, медицинским лабораторным техником.

Информация о типе анализируемого образца

Сыворотка крови человека.

Информация о популяционных, демографических аспектах применения медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для профессионального использования в условиях лечебно-профилактического учреждения для исследования биоматериала беременных женщин любого возраста без градации по популяционному признаку.

Описание аналита

Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (РАРР-А) представляет собой макромолекулярный гликопротеин, продуцируемый плацентарным трофобластом. Его молекулярная масса составляет 800 кДа, В плазме крови белок присутствует в виде гетеротетрамера ^[1,2]. РАРР-А нельзя определить у здоровых мужчин и небеременных женщин. При неосложненной беременности уровень РАРР-А в материнской сыворотке повышается на протяжении всей беременности до ее окончания. Этот показатель быстро растет в начале беременности, замедляется во втором триместре и достигает своего максимума в третьем триместре ^[3]. Определение уровня РАРР-А применяется для скрининга риска хромосомных аномалий плода, при оценке угроз выкидыша и остановки развития беременности на малых сроках.

Принцип измерения

В основе анализа лежит одностадийный сэндвич-метод. В реакционную ячейку добавляют образец, покрытые антителами к РАРР-А парамагнитные микрочастицы и антитела к РАРР-А, меченные пероксидазой хрена. В процессе инкубации присутствующий в образце РАРР-А одновременно реагирует с антителами на микрочастицах и антителами в составе ферментного конъюгата. После отмывки в результате иммунологических реакций образуется комплекс: твердая фаза – РАРР-А из образца – антитела, меченные ферментом. После добавления хемилюминесцентного субстрата образующийся комплекс катализирует запуск хемилюминесцентной реакции. Интенсивность свечения в результате хемилюминесцентной реакции измеряется в относительных единицах люминесценции (RLU). Величина RLU прямо пропорциональна концентрации РАРР-А в исследуемом образце.

Предоставляемые материалы

	100 тестов	50*2 тестов
Раствор микрочастиц (Microparticles Solution)	2,3 мл*1	1,2 мл*2
Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate)	11,0 мл*1	5,5 мл*2
Разбавитель образца (Sample Diluent)	5,5 мл*1	3,0 мл*2
Калибраторы PAPP-A для AutoLumo	2 флакона с лиофилизированными калибраторами: - Калибратор низкого уровня (Calibrator A) с целевым значением 200 мМЕ/л; - Калибратор высокого уровня (Calibrator B) с целевым значением 8000 мМЕ/л. Состав калибраторов: PAPP-A человеческого происхождения, MOPS-буфер, консерванты. Восстановите содержимое каждого флакона точным объемом дистиллированной или деионизированной воды, равным 1,0 мл. Выдержите закрытый флакон 15 минут. Аккуратно перемешайте содержимое для обеспечения однородности, переворачивая флакон.	
Контроль	2 флакона с лиофилизированными контролями: - Контроль низкого уровня (Quality Control 1) с диапазоном значений 161,18 - 268,66 мМЕ/л; - Контроль высокого уровня (Quality Control 2) с диапазоном значений 3210,78 - 5351,30 мМЕ/л. Состав контролей: PAPP-A человеческого происхождения, MOPS-буфер, консерванты. Восстановите содержимое каждого флакона точным объемом дистиллированной или деионизированной воды, равным 1,0 мл. Выдержите закрытый флакон 15 минут. Аккуратно перемешайте содержимое для обеспечения однородности, переворачивая флакон.	
Прочее	Инструкция по применению - 1 шт., вкладыш со штрих-кодом для калибраторов - 1 шт., вкладыш со штрих-кодом для контролей - 1 шт.	

Информация об основном реагенте PAPP-A

Раствор микрочастиц (Microparticles Solution)	Микрочастицы, покрытые мышинными моноклональными антителами к PAPP-A, в бис-трис-пропановом буфере, содержащем консерванты
Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate)	Меченные пероксидазой хрена мышинные моноклональные антитела к PAPP-A в бис-трис-пропановом буфере, содержащем консерванты
Разбавитель образца (Sample Diluent)	Фосфатно-солевой буфер, содержащий бычий сывороточный альбумин и консерванты

Анализаторы, в которых может использоваться данный набор

Набор PAPP-A CLIA Microparticles (PAPP-A) предназначен для использования на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo.

Необходимые, но не предоставляемые материалы

1. Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор серии AutoLumo;
2. Реакционные кюветы (Reaction vessel) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo № РЗН 2025/24717;
3. Чашечки для образцов (Sample cup) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo № РЗН 2025/24581;
4. Набор хемилюминесцентных субстратов (Chemiluminescent Substrate) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo № РЗН 2024/23674;
5. Раствор промывающий (System Wash) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo № РЗН 2024/23680;
6. Раствор промывающий (Wash Buffer) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo № РЗН 2024/23682;
7. Разбавитель образцов (Diluent Universal) для анализаторов иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo № РЗН 2024/23670;
8. Вода дистиллированная или деионизированная

Метрологическая прослеживаемость калибраторов

Аналит в калибраторах PAPP-A CLIA Microparticles (PAPP-A) согласуется с первичным калибратором производителя на каждом уровне концентрации. Процесс метрологической прослеживаемости калибраторов основан на EN ISO 17511.

Особые указания и меры предосторожности при применении

1. Только для профессионального применения и для диагностики *in vitro*.
2. Тщательно следуйте инструкции по применению. Достоверность результатов анализа не может быть гарантирована в случае ее несоблюдения.
3. При помощи описанной процедуры можно работать с образцами от пациентов и компонентами, полученными из крови, с минимальным риском. Тем не менее, с этими образцами нужно обращаться как с потенциально инфицированными в соответствии с универсальными мерами предосторожности и надлежащей клинической лабораторной практикой независимо от их происхождения, проведенного лечения или предварительной сертификации. Для обеззараживания используйте подходящее дезинфицирующее средство. Храните и утилизируйте эти материалы и их упаковку в соответствии с местными санитарными нормами, правилами и рекомендациями.
4. Для получения информации об опасных веществах, которые могут присутствовать в этом наборе, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала и информацией об изделии.
5. При обращении с потенциально загрязненными материалами и отходами необходимо соблюдать меры безопасности, соответствующие местным санитарным нормам.
6. **ВНИМАНИЕ:** этот набор содержит материалы человеческого и животного происхождения. Все материалы человеческого и животного происхождения следует считать потенциально инфицированными. Компоненты из тканей крупного рогатого скота произведены в странах, в которых не зарегистрированы случаи трансмиссивной губчатой энцефалопатии (ТГЭ).
7. В рабочем помещении запрещено курить, принимать напитки, пищу и пользоваться косметикой.
8. При работе с образцами и реагентами используйте защитную одежду и одноразовые

- перчатки. После завершения работы вымойте руки.
9. Соблюдайте осторожность при работе с образцами, взятыми у пациентов, во избежание перекрестного загрязнения. Используйте одноразовые пипетки или наконечники для дозаторов.
 10. В окружающей среде в помещении для проведения анализа не должны присутствовать высокие концентрации агрессивных соединений, таких как хлорноватистая кислота, щелочь, ацетальдегид и т. д., и пыль.
 11. Не используйте реагенты после истечения указанного срока годности.
 12. Не смешивайте и не используйте компоненты из наборов с различными номерами партий.
 13. При хранении калибраторов убедитесь, что флаконы надежно закрыты.
 14. Перед загрузкой микрочастиц в анализатор убедитесь, что они ресуспендированы.
 15. Не допускайте образования пены во всех реагентах и образцах.
 16. Не заменяйте реагенты в данном наборе реагентами других производителей.
 17. Обо всех серьезных инцидентах следует сообщать производителю и уполномоченному органу страны, в которой находится пользователь и/или пациент.

Условия хранения

1. При хранении набора при температуре 2-8 °С стабильность компонентов сохраняется до истечения срока годности, указанного на маркировке. Необходимо избегать контакта с прямыми солнечными лучами.
2. Перед использованием поместите набор реагентов в анализатор минимум на 2 часа.
3. Хранить вскрытые реагенты в анализаторе при температуре 2-10 °С или в холодильнике с температурой 2-8 °С в вертикальном положении не более 28 дней, реагенты вне анализатора рекомендуется хранить в оригинальных лотках и коробках.
4. Сразу после анализа запечатайте и поместите оставшиеся калибраторы в холодильник с температурой 2-8 °С, при этом их стабильность будет сохраняться в течение 7 дней. Также возможно хранение восстановленных калибраторов при температуре -20°С в течение 1 месяца.
5. Восстановленные контроли могут храниться при температуре 2-8 °С в течение 7 дней, при температуре -20 °С - до 1 месяца.
6. Срок годности набора составляет 18 месяцев.

Образцы

1. Для проведения этого анализа используется сыворотка крови человека.
2. Соблюдайте требования надлежащей медицинской практики при взятии образцов. После забора крови следуйте инструкциям производителя по обработке пробирок для сбора сыворотки.
3. Не используйте инактивированные нагреванием образцы. Не используйте образцы с азидом натрия в качестве консерванта.
4. Не используйте образцы с явной микробной контаминацией.
5. Осадок и взвешенные частицы в образцах могут помешать результатам анализа, поэтому их следует удалить центрифугированием. Перед центрифугированием убедитесь, что в образцах полностью сформировался сгусток. Время свертывания крови в некоторых образцах, особенно взятых у пациентов, получающих антикоагулянтную или тромболитическую терапию, может быть увеличено. Если образец центрифугируется до

полного образования сгустка, наличие фибрина может привести к ошибочным результатам. Перед применением убедитесь, что не произошло лизиса образцов.

6. Перед постановкой в анализатор необходимо удалить из образцов сгустки или эритроциты.
7. Недостаточная обработка образца или его повреждение при транспортировке могут привести к искажению результатов.
8. Не используйте образцы с выраженным гемолизом, липемией и мутностью.
9. Размороженные образцы, содержащие эритроциты или твердые частицы, а также мутные или мутноватые на вид, перед использованием необходимо центрифугировать во избежание искажения результатов.
10. Следует учитывать, что в образцах, которые не содержат видимых механических включений, могут присутствовать волокна фибрина.
11. При невозможности контроля за правильным отбором и подготовкой проб, либо при повреждении образцов в результате транспортировки или обработки рекомендуется провести дополнительный этап центрифугирования. В процессе центрифугирования твердые частицы должны быть удалены.
12. Для получения оптимальных результатов проверьте все образцы на наличие пузырьков. Перед анализом следует удалить пузырьки с помощью наконечника. Во избежание перекрестного загрязнения используйте для каждого образца новый наконечник.

Хранение образцов

Образцы, закрытые крышками, хранятся при комнатной температуре (18-25 °C) не более 8 ч, при температуре 2-8 °C не более 48 ч. Образцы, которые необходимо хранить или транспортировать в течение более длительного времени, нужно заморозить при температуре -20 °C. Не допускайте многократных циклов замораживания-оттаивания. Тщательно перемешайте размороженные образцы с помощью вортекса или перевернув флакон 10 раз. Осмотрите образцы и, если наблюдается их расслоение, продолжайте перемешивание до тех пор, пока образцы не станут однородными. После разморозки доведите температуру образцов до комнатной и тщательно перемешайте, слегка встряхивая.

Условия транспортировки

Набор можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре 2-8 °C, при этом невскрытые изделия сохраняют стабильность до окончания срока годности.

Наборы в транспортной упаковке устойчивы к воздействию механических факторов, возникающих при транспортировании. Наборы, транспортировавшиеся с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Процедура измерения

1. Проверьте подготовленные расходные материалы
 - Перед проведением анализа убедитесь в наличии достаточного количества расходных материалов.
 - См. Руководство по эксплуатации анализатора.
2. Загрузите набор
 - Перемешайте содержимое новых (невскрытых) упаковок реагентов, осторожно перевернув их несколько раз перед загрузкой в анализатор, до полного перемешивания. Не

переворачивайте вскрытые (проколотые) упаковки. При необходимости осторожно встряхните флакон в горизонтальном положении для перемешивания после первой загрузки. Не допускайте образования пузырьков во время перемешивания.

- Отсканируйте карточку с кодом на упаковке реагента, чтобы автоматически получить необходимые параметры для теста.
- См. Руководство по эксплуатации анализатора.

3. Калибровка

- Отсканируйте карточку с кодом, чтобы автоматически получить необходимые параметры для теста.
- Перенесите калибраторы в мерные стаканчики или пробирки для проб и поместите их в штатив.
- Загрузите штатив в анализатор и введите информацию о калибровке в интерфейс системного программного обеспечения.
- Нажмите «▶» (Запуск), чтобы начать тест, после чего происходит определение калибровочного графика системы, калибровку необходимо выполнять каждые 28 дней.
- Выполните новую калибровку в следующих случаях:
 - Используется набор реагентов с новым номером партии
 - По истечении срока действия калибровочного графика
 - При замене или ремонте важных компонентов анализатора
 - Иные случаи, требующие повторной калибровки
- См. Руководство по эксплуатации анализатора.

4. Разведите образец

- Образцы с уровнем PAPP-A выше 10000 мМЕ/л можно разводить автоматически с помощью программы анализатора. Для разведения используется универсальный разбавитель образцов. Программное обеспечение учитывает разведение при выдаче результатов исследования.
- После разведения концентрация образца должна быть не менее 50 мМЕ/л.

5. Порядок выполнения тестов

- Поместите стаканчики или пробирки с образцами в штатив. Минимально необходимый объем образца указан в Руководстве по эксплуатации анализатора.
- Загрузите штатив с образцами и введите данные образца в интерфейс программного обеспечения системы.
- Выберите «▶» (Запуск), чтобы начать анализ, при этом анализатор проводит тестирование автоматически.
- См. Руководство по эксплуатации анализатора.

6. Контроль качества

Используйте Контроль 1 и Контроль 2 не менее одного раза в день проведения анализа. Используйте автоматическую процедуру контроля качества.

- Отсканируйте карточку с кодом, чтобы автоматически получить необходимую информацию для теста.
- Выберите процедуру контроля качества в интерфейсе системного программного

обеспечения и нажмите «►» (Запуск), чтобы начать тест.

Примечание:

- Контроли должны быть протестированы с использованием режима контроля качества, в противном случае возможны неправильные результаты.
 - При изменении серии контролей и/или реактивов следует повторно выполнить контроль качества.
 - Не допускается перекрестное использование контролей из различных серий.
 - Если значения контрольных образцов не попадают в ожидаемый интервал, то связанные с ними результаты анализа могут быть недействительными и может потребоваться повторный анализ. Также в этом случае может потребоваться повторная калибровка анализатора.
- Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория разработала свою программу контроля качества в соответствии с применимыми государственными нормами и местными руководствами.

Процедура контроля

Материалы для контроля качества имитируют характеристики образцов пациентов и необходимы для мониторинга рабочих характеристик аналитической системы. Поскольку образцы можно анализировать в любое время в «случайном порядке», а не «партиями», материалы для контроля качества должны включаться в каждый 24-часовой период работы. По усмотрению пользователя, для выполнения требований надлежащей лабораторной практики или аккредитации лабораторий и применимого законодательства допускается более частое использование контролей или использование дополнительных контролей. Следуйте инструкциям производителя по восстановлению и хранению. Каждая лаборатория должна установить средние значения и приемлемые диапазоны для обеспечения надлежащих рабочих характеристик. Если результаты контроля качества не соответствуют допустимому диапазону, результаты анализа могут быть недействительными. Проверьте все результаты тестирования, полученные с последней приемлемой точки контроля качества для данного аналита. Просмотреть информацию по результатам контроля качества можно в соответствующих руководствах системы и/или в разделе Помощь.

Результаты измерения

Результаты анализа образца получают автоматически с помощью программного обеспечения системы. Количество PAPP-A в образцах определяется по измеренной интенсивности свечения с помощью сохраненных калибровочных данных. Следуйте Руководству по эксплуатации анализатора для просмотра сохраненных данных. Единицей измерения по умолчанию является мМЕ/л.

Диапазон нормальных значений (биологический референтный интервал)

Срок беременности (недели)	Кол-во	Медиана (мМЕ/л)
9	102	571
10	155	956
11	189	1605
12	223	2517
13	278	3692

Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория верифицировала референтный диапазон, подтвердив, что биологическая референтная популяция соответствует популяции,

обслуживаемой лабораторией.

Ограничения методики

1. Этот анализ предназначен в качестве вспомогательного средства для постановки клинического диагноза. Результаты этого анализа нужно интерпретировать в сочетании с клиническим обследованием, анамнезом пациента и данными других исследований.
2. Если результаты не согласуются с клиническими данными, следует провести дополнительные анализы для подтверждения результата.
3. Точный расчет недель беременности позволяет получить точные результаты для оценки степени риска.
4. Данный набор реагентов разработан и валидирован для работы с сывороткой крови человека, полученной из проб отдельных пациентов и доноров. Не следует использовать объединенные образцы, поскольку точность результатов их тестирования не подтверждена.
5. Диапазон измерения составляет 25-10000 мМЕ/л. Если предполагаемые уровни PAPP-A превышают границу диапазона измерения, возможно разведение универсальным разбавителем образцов (максимальное рекомендуемое разведение составляет 1:10).

Сведения об аналитических характеристиках медицинского изделия

1. Прецизионность измерений

Коэффициент вариации при оценке сходимости составляет < 15 %. Были протестированы 2 пула панели сывороток человека (1 и 2) с использованием 1 партии реагентов в 10 повторностях. Результаты этого исследования представлены в таблице ниже.

Панель сывороток	Партия	n	Среднее значение	Сходимость	
				Стандартное отклонение	CV, %
1	1	10	265,4	11,94	4,50
2	1	10	4066,9	175,16	4,31

Коэффициент вариации при оценке воспроизводимости составляет < 20 %. Были протестированы 2 пула панели сывороток человека (1 и 2) с использованием 1 партии реагентов в 10 повторностях один раз в день в течение 3 дней. Результаты этого исследования представлены в таблице ниже.

Панель сывороток	Партия	n	Среднее значение	Воспроизводимость	
				Стандартное отклонение	CV, %
1	1	30	257,56	25,35	9,67
2	1	30	4056,46	366,76	8,59

2. Аналитическая чувствительность

Предел холостой пробы (LoB): 5,0 мМЕ/л.

Предел обнаружения (LoD): 25,0 мМЕ/л.

Предел количественного определения (LoQ): 30,0 мМЕ/л.

3. Аналитическая специфичность

Перекрестная реактивность: перекрестная реакция с веществами в таблице ниже в указанных концентрациях не наблюдалась.

Вещество	Концентрация	Результат перекрестной реактивности
ангиотензин II	2 нг/мл	< 5,0 мМЕ/л
α -макроглобулин	9 мг/мл	< 5,0 мМЕ/л

Интерференция: не было обнаружено влияния следующих эндогенных веществ на результаты анализа до указанных концентраций:

Эндогенные интерференты	Исследуемая концентрация
Билирубин	80 мг/дл
Гемоглобин	100 мг/дл
Триглицериды	1000 мг/дл

Интерференция отсутствовала со стороны экзогенных интерферентов: 0,2 мг/мл метронидазола, 1 мг/мл аспирина, 0,5 мг/мл ибупрофена, 0,05 мг/мл доксициклина, 0,235 мг/мл мочевой кислоты, 0,154 мг/мл цистеина, 250 мг/л преднизолона, 200 мг/л гидрокортизона, 10 мг/л фуросемида, 2500 мг/л амиодарона.

4. Исследование точности с помощью корреляции

Было проведено сравнительное исследование, в котором образцы исследовали с использованием данного набора реагентов и коммерчески доступного набора для иммунологического анализа. Данные были проанализированы и резюмированы в таблице ниже.

Корреляционный метод	Количество образцов	Точка пересечения	Наклон	Коэффициент корреляции
Линейная регрессия	478	-56,683	0,9858	0,953

5. «Хук»-эффект

При анализе образца с добавлением PAPP-A до концентрации 120000 мМЕ/л «хук»-эффект отсутствовал.

Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

Медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Не применимо.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует стабильность медицинского изделия до окончания срока годности при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, указанных в инструкции. Производитель гарантирует безопасность медицинского изделия, отсутствие недопустимого риска причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде при использовании набора реагентов по назначению в условиях, предусмотренных производителем.

Сведения о производителе (изготовителе)/разработчике медицинского изделия

Autobio Diagnostics Co., Ltd. (Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.),
No. 87 Jingbei Yi Road, National Eco & Tech Development Area, 450016 Zhengzhou, People's Republic of China (Китайская Народная Республика).

Сведения о месте (местах) производства медицинского изделия

Autobio Diagnostics Co., Ltd.,
No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, 450016 Zhengzhou, People's Republic of China.

Рекламации

По вопросам качества продукции обращаться:

Общество с ограниченной ответственностью «АзияМедКонсалт», Россия, 109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10.

Телефон: +7 495 988 47 44

E-mail: info@asiamc.ru

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует МИ

Стандарт	Описание
EN ISO 13485:2016/A11:2021 (ГОСТ ISO 13485-2017)	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
EN ISO 17511:2021 (ГОСТ Р ИСО 17511-2022)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Требования к установлению метрологической прослеживаемости значений, приписанных калибраторам, контрольным материалам правильности и образцам биологического материала человека
ISO 14971:2019/A11:2021 (ГОСТ ISO 14971-2021)	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN ISO 18113-1:2022 (ГОСТ Р ИСО 18113-1-2024)	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставленная изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
EN ISO 18113-2:2022 (ГОСТ Р ИСО 18113-2-2024)	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставленная изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального использования
EN ISO 15223-1:2021 (ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023)	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования

EN 13612:2002 (ГОСТ Р EN 13612-2010)	Оценка функциональных характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro
EN 13641:2002 (ГОСТ Р EN 13641-2010)	Устранение или снижение риска инфицирования, связанного с реагентами для диагностики in vitro
EN ISO 23640:2015 (ГОСТ Р ИСО 23640-2015)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro

Список литературы

1. Rosen SW. New Placental Proteins: Chemistry, Physiology and Clinical Use[J]. Placenta, 1986, 7:575-594.
2. Overgaard MT, Sorensen ES, Stachowiak D, Boldt HB, Kristensen L, Sottrup-Jensen L, Oxvig C. Complex of Pregnancy-associated Plasma Protein-A and the Proform of Eosinophil Major Basic Protein[J]. J Biol Chem, 2003, 278 (4):2106-2117.
3. Cuckle, H.S. and van Lith, J.M.M.: Appropriate biochemical parameters in first trimester screening for Down's syndrome[J]. Prenat. Diagn., 1999, 19:505-512.

УДОСТОВЕРЕНИЕ



*/Эмблема/: КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ (ССРІТ)*

Китайский комитет по содействию международной торговле (ССРІТ)
Международная торговая палата Китая (ССОІС)

02907599

*/Голографическая наклейка/: Китайский комитет по
содействию международной торговле (CCPIT)*

**Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT)
Международная торговая палата Китая (CCOIC)**

СЕРТИФИКАТ

/QR-код/

№ 251100B0/006580

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что печать компании «АУТОБИО
ДИАГНОСТИКС КО., ЛТД.» (AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.) на приложенном
ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

*/Печать/: УДОСТОВЕРЕНИЕ * КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (CCPIT)*

*/Рельефный оттиск на удостоверительной наклейке/: СЕРТИФИКАЦИЯ * /неразборчиво/*

**Китайский комитет по содействию
международной торговле (CCPIT)**

*/Печать/: СЕРТИФИКАЦИЯ *
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО
СОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ (CCPIT)*

Подпись уполномоченного представителя:
Чэнь Яо (Chen Yao)

Дата: 10 февраля 2025 г.

Удостоверение можно проверить по ссылке: <http://www.rzccpit.com/validate.html>.

*/Водный знак/: Китайский комитет по содействию международной торговле (CCPIT) Международная
торговая палата Китая (CCOIC)*



/Логотип/: «Аутобио»

«Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.»

(Autobio Diagnostics Co., Ltd.)

(No.87 Jingbei Yi Road, National Eco&Tech Development
Area Zhengzhou, China, 450016)

Тел.: +86-371-67985313; эл. почта: info@autobio-
diagnostics.com

www.autobio-diagnostics.com

Настоящим удостоверяется, что прилагаемый документ является точной и верной копией
следующего документа:

Инструкция по применению медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения ассоциированного с
беременностью протейна плазмы А в сыворотке крови человека (PAPP-A CLIA
Microparticles (PAPP-A)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии
AutoLumo**

УТВЕРЖДЕНО:

**AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD., («Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.»), No. 87
Jingbei Yi Road, National Eco & Tech Development Area, 450016 Zhengzhou, People's
Republic of China (Китайская Народная Республика)**

*/Печать/: СЕРТИФИКАЦИЯ * КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ (ССРП)*

Имя, фамилия: Хэцзы Чжан (Hezi Zhang)

**Должность: менеджер по нормативно-правовым вопросам компании Autobio
Diagnostics Co., Ltd. («Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.»)**

Подпись: /Подпись/

**Место и дата выдачи: 06 февраля 2025 г., Autobio Diagnostics Co., Ltd. («Аутобио
Диагностикс Ко., Лтд.»)**

/Печать/: AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. («Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.»)
4101055161294*

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Марковым Александром Александровичем.



Российская Федерация

Город Москва

Четвёртого марта две тысячи двадцать пятого года.

Я, Якубова Татьяна Олеговна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.


Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2025-25-860

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 20 лист(а)(ов)

Нотариус

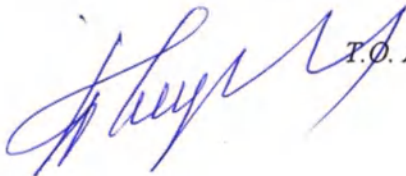

Т.О. Якубова

