



19 ЗАО «Медтехника»
Юр. ос. А. И.
ЗАО «Медтехника»

198516 г. С-Петербург
Петродворец, ул. Фабричная д.1
Тел/факс 8-812-326-54-71

Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон «ФАЭТОН»

ТУ 9396-220-27418804-2009.

ЭТИКЕТКА

1. Назначение

Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон «ФАЭТОН» предназначен для использования в качестве тренажера с целью многоуровневого нейрофизиологического и ортопедического воздействия на туловище, суставы и сегменты конечностей с одновременным пневмокорсетированием туловища и фиксирующим ортезированием конечностей.

1. Области применения:

- 1.1 Для индивидуального использования немедицинским персоналом с предварительным обучением.
- 1.2 Для использования в лечебных и лечебно-профилактических организациях.

2. Технические данные и характеристика изделия:

2.1 Нейро-ортопедический реабилитационный комбинезон (в дальнейшем комбинезон) может эксплуатироваться и храниться при температуре окружающего воздуха от в диапазоне температур от плюс 10°C до плюс 35°C.

2.2 Комбинезон выпускается в 23-х размерах; для ростов от 86см до 194см; обхват груди от 46см до 128см.

2.3 Типоразмеры комбинезона на типовые фигуры приведены в таблице № 1.

2.4 Покрой комбинезона позволяет одевать его на пациента нетравмотичным способом за счёт наличия легко освобождаемой центральной вставки.

2.5 Комбинезон одевается на нижнее хлопчатобумажное белье.

2.6 Обжим тела пациента обеспечивается системой фиксирующее-натяжных устройств.

2.7 В состав комбинезона включена пневмосистема, обеспечивающая дополнительное пневмокорсетирование туловища и суставов конечностей.

2.8 Средний срок службы комбинезона до списания -не менее 2-х лет (за исключением пневмокамер).

Таблица 1

Рост (см)	Обхват груди (см)									
	46	48	52	56	60	64	72	80	96	112
	56	56	60	64	72	80	88	96	112	128
86 - 92	1A									
92 - 98	2A									
98 - 104		3A								
104- 110			4A							
110- 116			5A							
116- 122				6A						

122- 128					7A					
128- 134					8A					
134- 140					9A					
140- 146						10A				
146-152						11A		XS		
152- 158						12A		XS		
158- 164							13A	S	1M	1L
164- 170							14A	S	1M	1L
170-176								1S	2M	2L
176- 182								1S	2M	2L
182- 188									3M	3L
188-194									3M	3L

3. Комплектность:

В комплект поставки комбинезона входят:

- 3.1. Изделие - 1шт.
- 3.2. Этикетка - 1шт.
- 3.3. Сумка транспортная - 1шт.

4. Указания мер безопасности:

- 4.1. Не подвергайте комбинезон воздействию острых режущих и колющих предметов.
- 4.2. Не подвергайте комбинезон воздействию горячих предметов и агрессивных жидкостей.

5. Рекомендации по дезинфекции комбинезона

- 5.1 Комбинезон дезинфицируется 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Ласка»
- 5.2 Допускается проводить ручную или щадящую машинную стирку комбинезона с использованием нейтральных стиральных порошков (типа «Ласка») при температуре плюс (40-50)°С. Перед стиркой необходимо извлечь из комбинезона пневмокамеры. Не рекомендуется стирка с мылом, ввиду плохой выполаскиваемости мыла из отдельных элементов комбинезона (застёжки «липучки»).

6. Гарантии изготовителя.

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров и характеристик требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации комбинезона 12 месяца с даты получения, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

7. Изготовитель.

ЗАО «Медтехника», 198516, г. Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Фабричная, д.1 тел. 326-54-71

Размер комбинезона _____ Номер комбинезона _____

Принято ОТК _____

Дата выпуска

Дата продажи: