


ОКП 93 9800

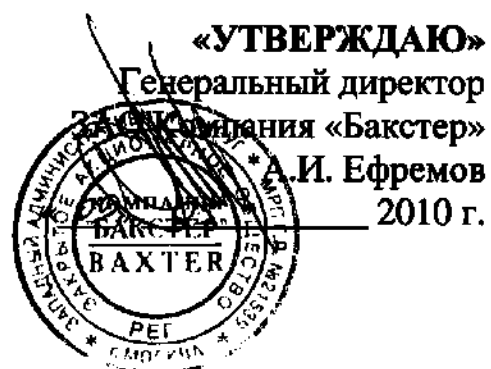

## **Инструкция по применению**

**Раствор антикоагулянт цитрат декстроза (формула А)  
в пластиковых контейнерах 500 мл, 1000 мл**

2010

## Инструкция по применению раствора Антикоагулянта Цитрат Декстроза (формула А) в пластиковых контейнерах VIAFLEX

**Предупреждение:** не использовать раствор для внутривенного введения.

### Описание:

Стерильный и апиrogenный раствор Антикоагулянт Цитрат Декстроза. Формула А (ACD-A) хранится в контейнере Виафлекс из ПВХ, стерилизован паром и содержит следующие ингредиенты:

### Формула:

Моногидрат лимонной кислоты 7,3

Дигидрат цитрата натрия 22,0

Моногидрат глюкозы 24,5

Вода для инъекций до 1000 мл

pH: 4,7 – 5,3

### Показание и использование:

Раствор ACD-A используется в качестве антикоагулянта для компонентов крови, получаемых на сепараторах клеток.

### Инструкция по применению:

1. Удалите защитную упаковку путем надрыва в указанном месте и извлеките контейнер.
2. Если необходимо, осторожно поправьте колпачок и порты.
3. Сожмите контейнер и внимательно осмотрите его на предмет утечки, а также проверьте, нет ли видимого помутнения раствора. Нельзя использовать контейнер при обнаружении утечки или видимом помутнении раствора, так как может быть нарушена стерильность.
4. При откручивании защитного колпачка:
  - возьмите маленькое крылышко узкого основания порта в одну руку
  - возьмите большое крылышко колпачка в другую руку и поверните
  - легко удалите колпачок
5. Используя асептическую упаковку, установите порт расходного комплекта для сепаратора клеток и приготовьте к использованию. Для правильного соединения, при использовании данного раствора обращайтесь к инструкции по использованию аферезного расходного набора.
6. После применения удалите все использованные контейнеры и их принадлежность.
7. Не рекомендуется использовать и добавлять дополнительные медикаменты при проведении процедуры с использованием крови или ее компонентов. Резиновую заглушку использовать только при взятии пробы раствора антикоагулянта (для контроля качества) после аферезной процедуры.

### Предупреждение:

1. Перед использованием нагреть раствор до комнатной температуры.
2. Убедитесь, что контейнер с раствором антикоагулянта правильно соединен с линией антикоагулянта аферезного комплекта во избежание неправильного соединения или утечки.

### Меры предосторожности:

1. Не вскрывать защитную упаковку заранее. Начать использовать контейнер непосредственно после удаления защитной упаковки.

2. Не использовать, если раствор непрозрачен или если нарушена целостность упаковки.
3. Не нарушать герметичность.
4. Удалите использованные или частично использованные порции раствора.

### Противопоказания:

Противопоказано использовать продукт с расходным комплектом сепаратора клеток только в тех случаях, когда нельзя превышать лимит антикоагулянта.

### Побочные действия:

Во время аферезной процедуры с использованием антикоагулянта у пациента могут наблюдаться такие симптомы, как пощипывание, в основном вокруг рта, а также мышечное подергивание, «чувство стеснения» в груди, озноб. Во избежание данных симптомов следует снизить скорость потока возвращаемой крови с антикоагулянтом. Такие реакции обычно происходят из-за умеренной гипокальцемии, возникающей в результате образования хелата кальция неметаболизированным цитратом.

### Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C

### Производитель:

Baxter S.A.  
Boulevard rene Branquart, 80  
7860 Lessines, Belgium

### Произведено для:



Fenwal, Inc.

Lake Zurich, IL 60047 USA

### Дистрибьютор (Responsible distributor) в России:

ЗАО «Компания Бакстер»,  
123007, г. Москва,  
ул. Розанова, д.10/1, 5 эт.  
тел: +7 (495) 956-3839

ECTIP

Federal Europe spol  
B-1435 Mont-Saint-Gilbert



Срок годности, дата окончания срока годности (shelf life and manufacturing date or expire date)

Дата и номер регистрации (The date and the number of registration)

Fenwal и InterSol – торговые марки Fenwal Inc.