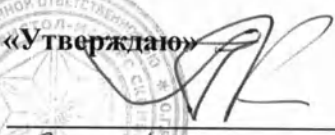


«Утверждаю»

А.М. Кожанов

**Инструкция по применению
изделия медицинского назначения
Инфузионная система «КОДАН»**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Необходимо тщательно промыть инфузионную систему изотоническим раствором натрия хлорида для инъекций перед использованием. Убедитесь, что во время обработки фильтр находится в **вертикальном положении**. Использовать незамедлительно после обработки. Колпачок выходного отверстия должен быть закрыт во время наполнения и внезапного прекращения вливания. Колпачок выходного отверстия должен быть открыт во время вливания. Максимально возможное время использования системы 24 часа.

Внимание

Система снабжена фильтром с диаметром пор 0.2 микрона.
Не содержит диэтилгексилфталат (ДЭГП).
Не использовать для вливания крови или компонентов крови.
Стерилизовано этиленоксидом, апиrogenно. Не использовать, если упаковка нарушена. После использования изделие уничтожить.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Не использовать после даты окончания срока годности, указанной на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КОДАН Португалия Медицинские приборы, Лда. (CODAN Portugal Instrumentos medicos Lda.), Португалия, Руа Монте Лавуро, 675-492 Одивелас, тел. +351219349454 / +351219349450, факс +351219327195

Директор департамента
нормативного обеспечения
Кожанов А.М.




01.06.2007