



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

— ООО «ЯДРАН»

Иованович Д.

« 20 » сентября 2023 г.



Проект маркировки на потребительскую упаковку медицинского изделия

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»



Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

1. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.

АКВА
МАРИС® для детей

с рождения

регулярный уход

НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР

- УДАЛЯЕТ СЛИЗЬ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА
- ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ



НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР + 4 ЭКСТРАМЯГКИЕ СМЕННЫЕ НАСАДКИ

Серия №:
Годен до:



**AQUA
MARIS®**



НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР



Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»
в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками

НАЗНАЧЕНИЕ: для удаления слизистых выделений из носа у детей при
инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

RU

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность
- 2 Присоединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора.
- 3 Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Повторить процедуру для другого носового хода.
- 4 Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

СОСТАВ: аспиратор – полиэтилен, силиконовый эластомер, полипропилен рацемический сополимер; насадки сменные – термопластичный эластомер, полипропилен рацемический сополимер; абсорбирующий фильтр – вспененный меламин

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № РЗН 2017/6327 от 06.10.2017 года

ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свишно 20,
51000 Риека, Хорватия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фармалинк, С.Л., Проспект Университат Аутонома, 13 Техно-
логический Парк дель Вальес - 08290 Серданьола-дель-Вальес, Барселона, Испания.

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА. ДЕ ВАЛЬС ТВ-2034,
КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в неповрежденной упаковочной коробке, с
защитой от прямого солнечного света, при нормальной температуре и влажности.

Претензии к качеству следует направлять в адрес ООО «ЯДРАН»: 119330, г.
Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, офис 30,
тел.: +7 (495) 970-18-82

930000761/01





Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

АКВА  для 
МАРИС® детей

RU

АКВА  для 
МАРИС® детей

с рождения

АКВА
МАРИС®
 для
детей

регулярный уход



НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР 

- УДАЛЯЕТ СЛИЗЬ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА
- ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ



НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР + 3 ЭКСТРАМЯГКИЕ СМЕННЫЕ НАСАДКИ

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»
в картонной коробке с тремя сменными насадками
ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о., Светно 20, 51000 Риека, Хорватия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фармаленк, С.Л., Проспект Университат Аутонома, 13
Технологический Парк дель Вальес - 08290 Сердальо дель Вальес,
Барселона, Испания
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА ДЕВАЛЬС ТВ-2034
КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА), ИСПАНИЯ



Претензии к качеству следует направлять в адрес
ООО «ЯДРАН»: 119330, г. Москва,
Ломоносовский проспект, д. 38, офис 30,
тел.: +7 (495) 970-18-82

ASS02168
2



AQUA MARIS®

for
kids

НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ТРЕМЯ ЭКСТРАМЯГКИМИ
СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ



НАЗНАЧЕНИЕ:

для удаления слизистых выделений из носа у детей
при инфекционно-воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Положить ребенка
на спину на безопасную
и удобную поверхность.



3 Взять мундштук в рот,
вставить наконечник в один
из носовых ходов ребенка
и осторожно втягивать ртом
воздух через мундштук.
Повторить процедуру
для другого носового хода.



2 Присоединить
сменную насадку
к центральной части
корпуса аспиратора.



4 Отсоединить
использованную
насадку и выбросить ее.

СОСТАВ: аспиратор – полиизопропилен, силиконовый эластомер,
полипропилен, полипропилен, полипропилен; насадки сменные –
термопластичный эластомер, полипропилен, полипропилен,
абсорбирующий фильтр – вспененный материал.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в неповрежденной
упаковочной коробке, с защитой от прямого солнечного света,
при нормальной температуре и влажности.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:
№ РЗН 2017/6327 от 06.10.2017 года

Серия №

Код №

jgl

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листа(ов).

Генеральный директор
ООО «ЦИРМИ» _____ Иванович Д.
«22» _____ 20 23.



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «ЯДРАН»

Иованович Д.


« 20 » сентября 2023 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия


Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

1. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками.

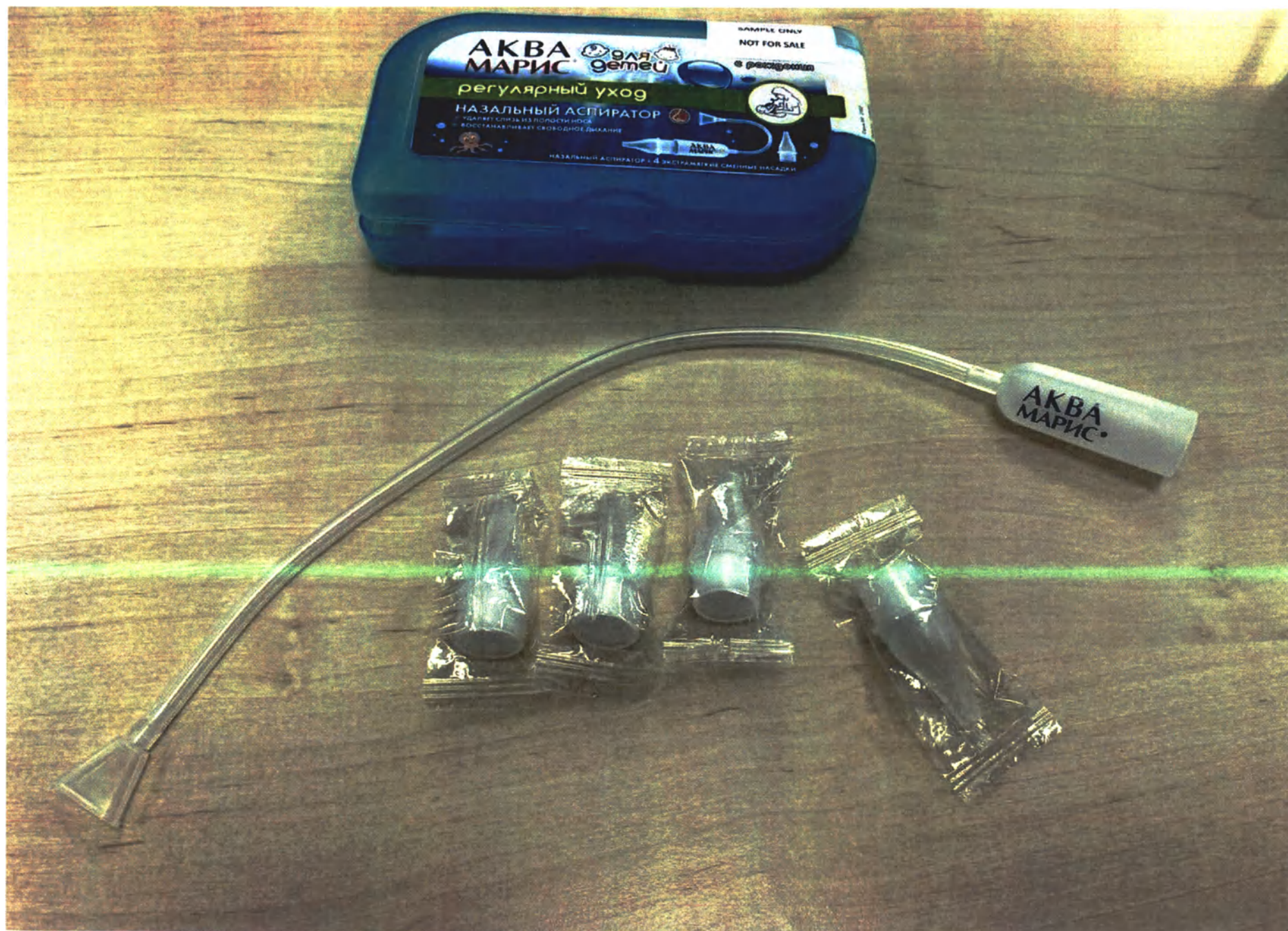



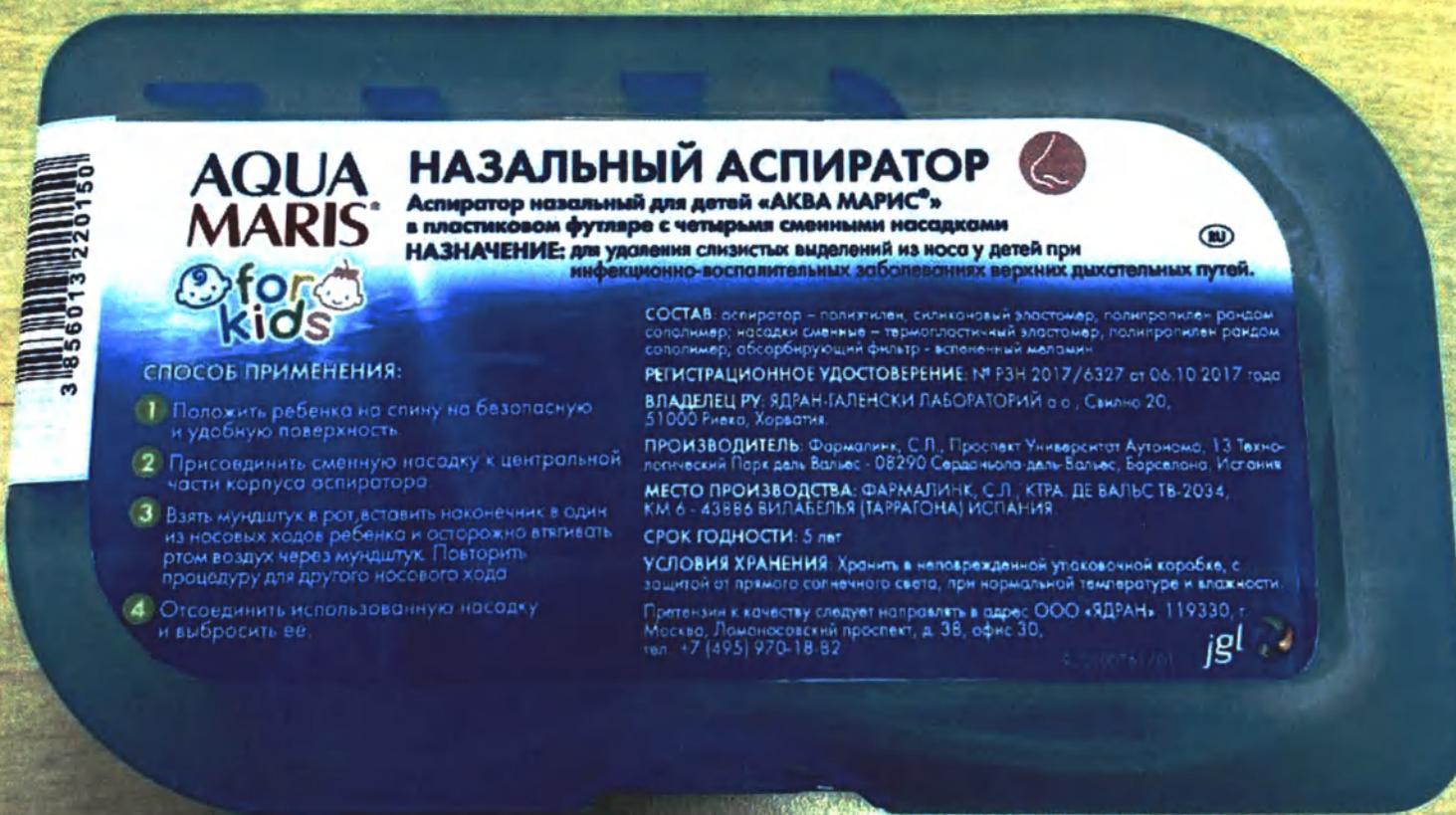

**AQUA
MARIS®**

**for
kids**

НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС»
в пластиковом футляре с четырьмя сменными насадками

НАЗНАЧЕНИЕ: для удаления слизистых выделений из носа у детей при
инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 Положить ребенка на спину на безопасную и удобную поверхность
- 2 Присовединить сменную насадку к центральной части корпуса аспиратора
- 3 Взять мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Повторить процедуру для другого носового хода
- 4 Отсоединить использованную насадку и выбросить ее.

СОСТАВ: аспиратор – полиэтилен, силиконовый эластомер, полипропилен-рандом-сополимер; насадки сменные – термопластичный эластомер, полипропилен-рандом-сополимер; абсорбирующий фильтр – вспененный меламин

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № РЗН 2017/6327 от 06.10.2017 года
ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о., Свильно 20,
51000 Риека, Хорватия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фармалинк, С.Л., Проспект Университат Аутонома, 13 Техно-
логический Парк дель Вальес - 08290 Сердачюла дель Вальес, Барселона, Испания

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА. ДЕ ВАЛЬЕС ТВ-2034,
КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в неповрежденной упаковочной коробке, с
защитой от прямого солнечного света, при нормальной температуре и влажности.

Претензии к качеству следует направлять в адрес: ООО «ЯДРАН» 119330, г.
Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, офис 30,
тел. +7 (495) 970-18-82

jgl



Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®»:

2. Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС®» в картонной коробке с тремя сменными насадками.

**АКВА
МАРИС®**

 **для
детей** 

с рождения

регулярный уход



НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР 

- УДАЛЯЕТ СЛИЗЬ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА
- ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ



НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР + 3 ЭКСТРАМЯГКИЕ СМЕННЫЕ НАСАДКИ

**AQUA
MARIS®**

**for
kids**

**НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ТРЕМЯ ЭКСТРАМЯГКИМИ
СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ**

НАЗНАЧЕНИЕ:
для удаления слизистых выделений из носа у детей
при инфекционно-воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей.



**SAMPLE ONLY
NOT FOR SALE**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Положить ребенка
на спину на безопасную
и удобную поверхность.



3 Взять мундштук в рот,
вставить наконечник в один
из носовых ходов ребенка
и осторожно втягивать ртом
воздух через мундштук.
Повторить процедуру
для другого носового хода.



2 Присоединить
сменную насадку
к центральной части
корпуса aspirатора.



4 Отсоединить
использованную
насадку и выбросить ее.

Претензии к качеству следует направлять в адрес
 ООО «ЯДРАН»: 119330, г. Москва,
 Ломоносовский проспект, д. 38, офис 30,
 тел.: +7 (495) 970-18-82

**АКВА
 МАРИС**


 для детей



Средство гигиены



**АКВА
 МАРИС**

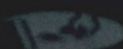

СОСТАВ: aspirator – полиэтилен, силиконовый эластомер, полипропилен рандом сополимер; насадки сменные – термопластичный эластомер, полипропилен рандом сополимер; абсорбирующий фильтр – вспененный меламин.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в неповрежденной упаковочной коробке, с защитой от прямого солнечного света, при нормальной температуре и влажности.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:
№ РЗН 2017/6327 от 06.10.2017 года

Серия № 2101

Годен до: 2026/05

Аспиратор назальный для детей «АКВА МАРИС»
в картонной коробке с тремя сменными насадками
ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ЮФАН-ТАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ д.о.о. Сжиљно 20-51000 Риока, Хорватия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фармапинк, С.Л. Прислукт Университат Аутонома, 11
Технолози-ескии Парк дель Вальес - 08290 Серданьола дель Вальес,
Барселона, Испания
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ФАРМАПИНК, С.Л., КИТА ДЕ ВАЛЬЕС 16-2034
КМ.6 - 43886 ВИЛАБЕЛЛА (ТАРРАГОНА), ИСПАНИЯ



3 856013 220143

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 12 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «ЦДН» Иванович Д

