


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Барьер»

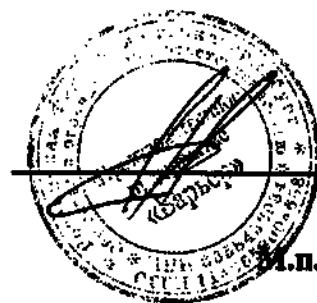

Г.В.Будлянский
«27» апреля 2015 г.

И.п.

Инструкция по применению
медицинского изделия

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные
«Барьер» в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-
002-35167765-2014

2015

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные «Барьер» в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-002-35167765-2014

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для применения взамен хлопчатобумажной одежды и белья при оказании лечебно-профилактической помощи, (кроме хирургических и других инвазивных процедур).

Одежда и белье могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), в социальных учреждениях.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

По назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости, взамен хлопчатобумажной одежды и белья

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Противопоказания к применению данного изделия не выявлены.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- перед использованием по назначению нестерильный комплект освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки.

Запрещается использовать нестерильный комплект в следующих случаях:

- если истек срок годности данной партии
- если нарушена целостность упаковки
- если упаковка находится во влажном состоянии

При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Побочных действий при использовании данного изделия не выявлены.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные «БАРЬЕР» в комплектах и отдельных упаковках совместимы со всеми медицинскими изделиями, в случаях, отсутствия прямого контакта с открытой раневой поверхностью.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Влияние данного медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводилось, так как изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Использовать по назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Перед использованием по назначению нестерильные одежду и белье в комплектах и отдельных упаковках освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки. При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования.

Одежда и белье медицинское одноразовое нестерильное «Барьер» в комплектах и отдельных упаковках, применяются взамен хлопчатобумажной одежды и белья в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), в социальных учреждениях, в течение одной смены (или раньше до загрязнения)

-наволочка, салфетка впитывающая, наматрачник, пеленка впитывающая, пеленка медицинская, пододеяльник; простыня медицинская влагонепроницаемая, простыня медицинская, используются в качестве белья для защиты постельных принадлежностей, медицинских кроватей, кушеток и пр., смена белья производится ежедневно (или раньше по мере загрязнения);

-салфетка медицинская, мешок медицинский защитный, покрывало на оборудование, простыня на инструментальный столик, чехол на инструментальный столик, чехол на медоборудование, карман-приемник используются для защиты медицинского оборудования и инвентаря от загрязнения, используются в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

-конверт для новорожденного используется для переноски одного новорожденного (новорожденный помещается внутрь конверта), используются в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

-валик для процедур, используется для удобства проведения процедур (например может подкладываться под пациента при проведении процедуры массажа в отделениях реабилитации и т.д.) используются для одного пациента в течение одних суток (или раньше до загрязнения);

-халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее), одевается медперсоналом поверх спецодежды и используется в течение смены (или подлежит замене раньше при загрязнении);

-бахилы хирургические (высокие или низкие) одеваются поверх обуви или одежды медперсоналом или пациентами и используются по потребности, подлежат замене при загрязнении;

-брюки хирургические, шапочка - «Шлем», Шапочка («Берет» или «Колпак»), комбинезон, куртка хирургическая, одеваются медперсоналом на тело, и используются в течение смены по потребности (подлежат замене при загрязнении);

-нарукавники, фартук хирургический защитный одевается медперсоналом поверх спецодежды, служат дополнительной защитой от загрязнений, и используется в течение одной смены (или подлежит замене раньше при загрязнении);

-маска медицинская одевается медперсоналом или пациентами, время использования одноразовой медицинской маски составляет 3 часа, нельзя касаться закрепленной на лице маски, после

снятия использованной маски нужно тщательно мыть руки с мылом, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос;

-накидка медицинская, тапочки медицинские одеваются пациентами или посетителями поверх одежды, используются по потребности

- чехол на конечности пациента одевается на тело пациента, используются по потребности

-рубашка для новорожденного, шапочка для новорожденного используются в акушерских отделениях, одеваются на тело новорожденного.

-рубашка для роженицы (для пациента), трусики процедурные используются в акушерских и других отделениях, одеваются на тело пациентов.

11. СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок годности изделий - 5 лет с даты изготовления.

Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5⁰С до +40⁰С.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

13. УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

14. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Не использованные одежду и белье медицинские одноразовые нестерильные «БАРЬЕР» в комплектах и отдельных упаковках, специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

15. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Барьер»

Юридический адрес: РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Гурзуфская,12,оф.6/3, телефон: (343)228-37-43, факс: (343)228-37-43, e-mail:
sg@barier.info.

Адрес места производства:

РФ, Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Александра Невского, 4

16. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Состав изделий в комплектах и их исполнение:

Комплект белья медицинского из нетканых материалов, одноразовый нестерильный «Барьер»	
1	Валик для процедур (длина х ширина х высота в см: (20,0-40,0)х(10,0-20,0)х(9,5-10,5) или (80-100)х(30-50)х(19,5-20,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
2	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-120,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
3	Конверт для новорожденного (длина х ширина х высота в см: (65,0-75,0)х(35,0-45,0)х(4,5-5,5) или (38,0-42,0)х(28,0-32,0)х(4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
4	Мешок медицинский защитный (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(27,0-33,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), (100,0-120,0)х(85,0-95,0), (120,0-140,0)х(100,0-120,0), (140,0-160,0)х(120,0-140,0), (160,0-180,0)х(140,0-160,0), (180,0-200,0)х(100,0-120,0), (200,0-220,0)х(120,0-140,0), (220,0-240,0)х(140,0-160,0), (240,0-260,0)х(160,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
5	Наволочка (длина х ширина в см: (9,0-11,0)х(9,0-11,0), (18,0-22,0)х(18,0-22,0), (27,0-33,0)х(27,0-33,0), (36,0-44,0)х(36,0-44,0), (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
6	Наматрачник (длина х ширина в см.: (85,0-95,0; 100,0-220,0)х (45,0-55,0; 65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
7	Пеленка впитывающая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
8	Пеленка медицинская (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
9	Пододуляльник (длина х ширина в см.:(85,0-95,0; 100,0-260,0) х (45,0-55,0; 65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-120,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
10	Покрывало на оборудование (длина х ширина в см: (310,0-330,0)х(190,0-210), (190-170,0)х(90,0-110,0), (200,0-220,0)х(130,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
11	Простыня медицинская влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
12	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
13	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
14	Салфетка впитывающая (длина х ширина в см: (30,0-75,0)х(30,0-75,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
15	Салфетка медицинская (длина х ширина в см: (30,0-75,0)х(30,0-75,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;

16	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (90,0-110,0)х(65,0-75,0), (120,0-140,0)х(85,0-95,0), (130,0-150,0)х(75,0-85,0), (150,0-170,0)х(85,0-95,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
17	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (13,0-17,0; 23,0-27,0; 33,0-37,0; 40,0-110,0; 130,0-280,0; 310,0-330,0)х(13,0-17,0; 23,0-27,0; 33,0-37,0; 40,0-110,0)), , производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
Комплект одежды медицинской из нетканых материалов, одноразовый нестерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические высокие (высота х длина в см: (35,0-55,0)х (33,0-39,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара;
2	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (14,0-16,0)х (33,0-39,0); (6,5-7,5)х(9,5-10,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара;
3	Брюки хирургические, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.
4	Комбинезон (длиной 170-190см.), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
5	Куртка хирургическая, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
6	Маска медицинская 3-х слойная (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая РУ№ФСР 2010/08512, производства ООО «МАСКА», Россия -1шт.);
7	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(130,0-150,0)х(160-180,0), (90,0-100)х(135,0-155,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
8	Нарукавники (длина в см: 45,0-55,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара.;
9	Рубашка для новорожденного (длина в см: 29,0-31,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
10	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 99,0-101,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
11	Тапочки медицинские (длина в см: 38,0-42,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара.;
12	Трусики процедурные (высота в см: 35,0-37,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
13	Фартук хирургический защитный (длина х ширина в см (90,0-110,0; 120,0-140,0) х (75,0-114,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
14	Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее) размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер» , Россия -1шт.;
15	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (45,0-55,0; 65,0-75,0; 85,0-95,0; 110,0-150,0) х (45,0-55,0; 65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара.;
16	Шапочка- «Шлем» (высота в см: 30,0-36,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
17	Шапочка «Берет» (в см: высота (13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
18	Шапочка «Колпак» (в см: высота (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
19	Шапочка для новорожденного (высота в см: 11,0-13,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;

Состав изделий в отдельных упаковках:

1	Бахилы хирургические высокие (высота х длина в см: (35,0-55,0)х (33,0-39,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 пара;
2	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (14,0-16,0)х (33,0-39,0); (6,5-7,5)х(9,5-10,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 пара;
3	Брюки хирургические, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.
4	Валик для процедур (длина х ширина х высота в см: (20,0-40,0)х(10,0-20,0)х(9,5-10,5) или (80-100)х(30-50)х(19,5-20,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
5	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-120,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
6	Комбинезон (длиной 170-190см.), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
7	Конверт для новорожденного (длина х ширина х высота в см: (65,0-75,0)х(35,0-45,0)х(4,5-5,5) или (38,0-42,0)х(28,0-32,0)х(4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
8	Куртка хирургическая, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
9	Мешок медицинский защитный (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(27,0-33,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), (100,0-120,0)х(85,0-95,0), (120,0-140,0)х(100,0-120,0), (140,0-160,0)х(120,0-140,0), (160,0-180,0)х(140,0-160,0), (180,0-200,0)х(100,0-120,0), (200,0-220,0)х(120,0-140,0), (220,0-240,0)х(140,0-160,0), (240,0-260,0)х(160,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
10	Наволочка (длина х ширина в см: (9,0-11,0)х(9,0-11,0), (18,0-22,0)х(18,0-22,0), (27,0-33,0)х(27,0-33,0), (36,0-44,0)х(36,0-44,0), (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
11	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(130,0-150,0)х(160-180,0), (90,0-100)х(135,0-155,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
12	Наматрачник (длина х ширина в см.: (85,0-95,0; 100,0-220,0)х (45,0-55,0; 65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
13	Нарукавники (длина в см: 45,0-55,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 пара.;
14	Пеленка впитывающая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
15	Пеленка медицинская (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
16	Пододояльник (длина х ширина в см.:(85,0-95,0; 100,0-260,0) х (45,0-55,0; 65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-120,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
17	Покрывало на оборудование (длина х ширина в см: (310,0-330,0)х(190,0-210), (190-170,0)х(90,0-110,0), (200,0-220,0)х(130,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
18	Простыня медицинская влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
19	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
20	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)х (65,0-75,0; 85,0-95,0; 100,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
21	Рубашка для новорожденного (длина в см: 29,0-31,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;
22	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 99,0-101,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1 шт.;

23	Салфетка впитывающая (длина х ширина в см: (30,0-75,0)х(30,0-75,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
24	Салфетка медицинская (длина х ширина в см: (30,0-75,0)х(30,0-75,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
25	Тапочки медицинские (длина в см: 38,0-42,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара.;
26	Трусики процедурные (высота в см: 35,0-37,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
27	Фартук хирургический защитный (длина х ширина в см (90,0-110,0; 120,0-140,0) х (75,0-114,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
28	Халат медицинский без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
29	Халат медицинский с усиленной защитной зоной, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
30	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (90,0-110,0)х(65,0-75,0), (120,0-140,0)х(85,0-95,0), (130,0-150,0)х(75,0-85,0), (150,0-170,0)х(85,0-95,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
31	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (45,0-55,0; 65,0-75,0; 85,0-95,0; 110,0-150,0) х (45,0-55,0; 65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1пара.;
32	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (13,0-17,0; 23,0-27,0; 33,0-37,0; 40,0-110,0; 130,0-280,0; 310,0-330,0)х(13,0-17,0; 23,0-27,0; 33,0-37,0; 40,0-110,0)) , производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
33	Шапочка «Берет» (в см: высота (13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
34	Шапочка «Колпак» (в см: высота (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
35	Шапочка- «Шлем» (высота в см: 30,0-36,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;
36	Шапочка для новорожденного (высота в см: 11,0-13,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.;

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

17.1 Изделия выпускаются нестерильными.

Изделия должны быть упакованы в потребительскую упаковку, представляющую собой герметичные полиэтиленовые пакеты, выполненные из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354, толщиной не менее 40 мкм.


Потребительские упаковки должны быть уложены в групповую упаковку (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Групповые упаковки должны быть уложены в транспортную тару (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или по ГОСТ Р 54463. Транспортная тара с комплектами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.



17.2 В состав комплектов входят Изделия контурной и прямоугольной формы, изготовлены из нетканых полотен типа Спан-мельт-спан (СМС), Вуденпалп, Спанлейс, ламинированный Спанлейс, ламинированный Спанбонд, Сантейс.

17.3. Общий вид изделий (рисунки 1 – 31).

Рисунок 1. Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее). Обозначение «Барьер 9398.002.01».

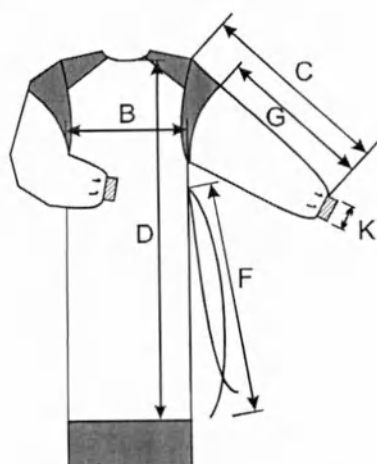

Халат на 2-х завязках

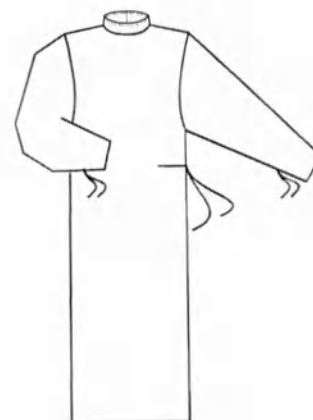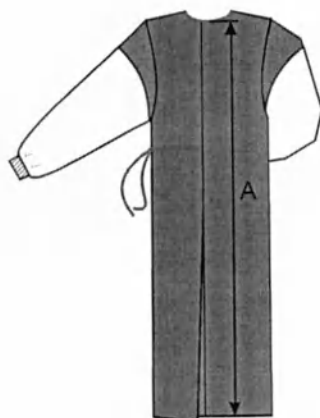

Халат на 4-х завязках

Рисунок 2. Куртка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.002.02».

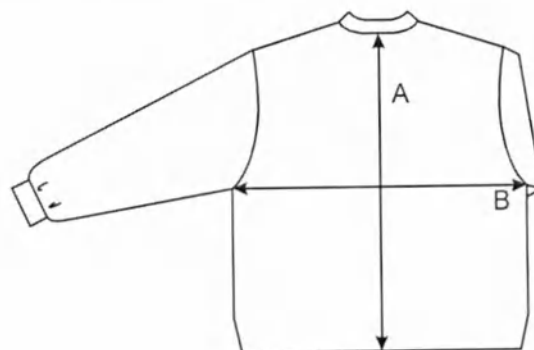
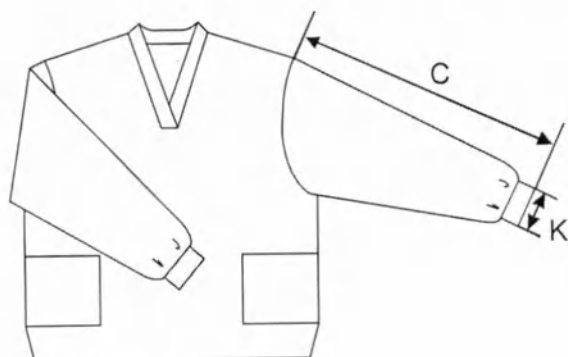


Рисунок 3. Брюки хирургические. Обозначение «Барьер 9398.002.03».

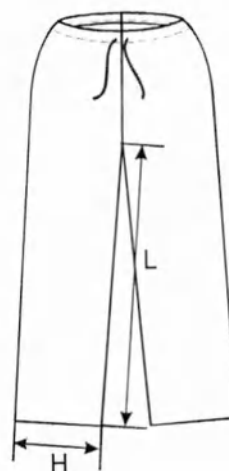
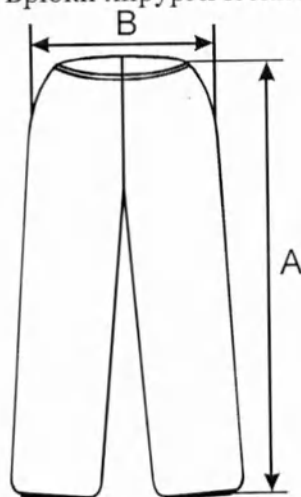


Рисунок 4. Комбинезон. Обозначение «Барьер 9398.005.04».

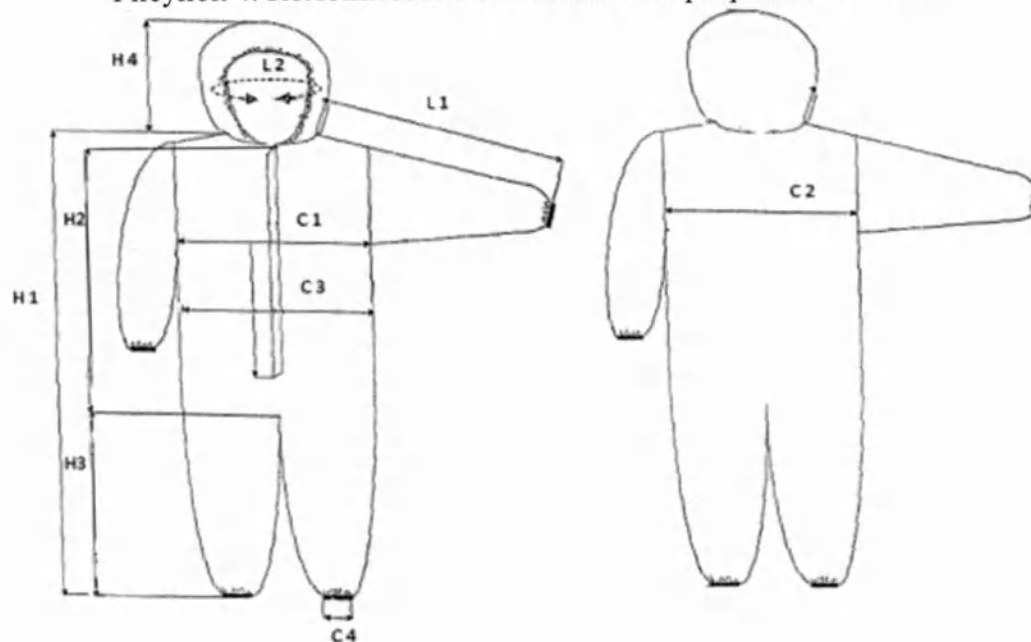


Рисунок 5. Фартук хирургический защитный Обозначение «Барьер 9398.002.05».

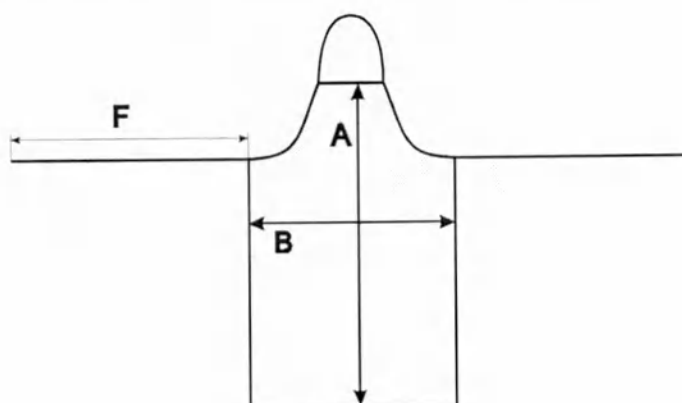


Рисунок 6. Шапочка «Колпак». Обозначение «Барьер 9398.002.06».

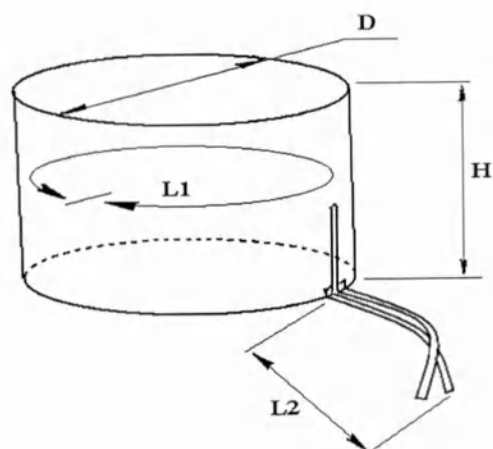


Рисунок 7. Шапочка «Берет». Обозначение «Барьер 9398.002.07».

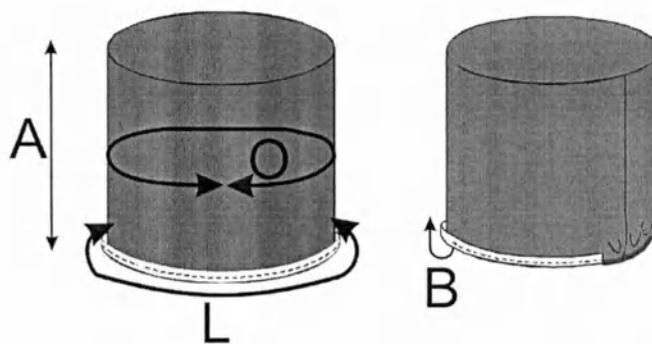


Рисунок 8. Шапочка «Шлем». Обозначение «Барьер 9398.002.08».

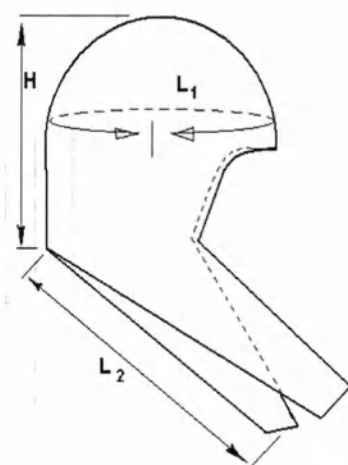


Рисунок 9. Шапочка «Шапочка».

Обозначение «Барьер 9398.002.9».

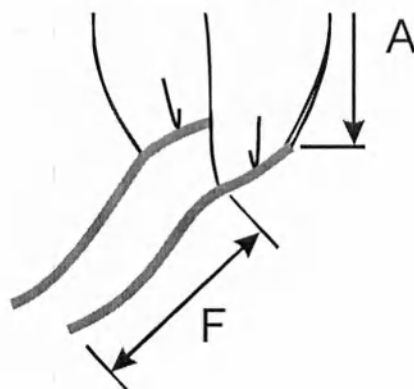


Рисунок 10. Бахилы хирургические низкие. Обозначение «Барьер 9398.002.10».

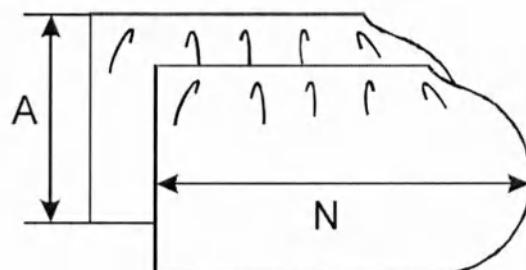


Рисунок 11. Бахилы хирургические высокие. Обозначение «Барьер 9398.002.11».

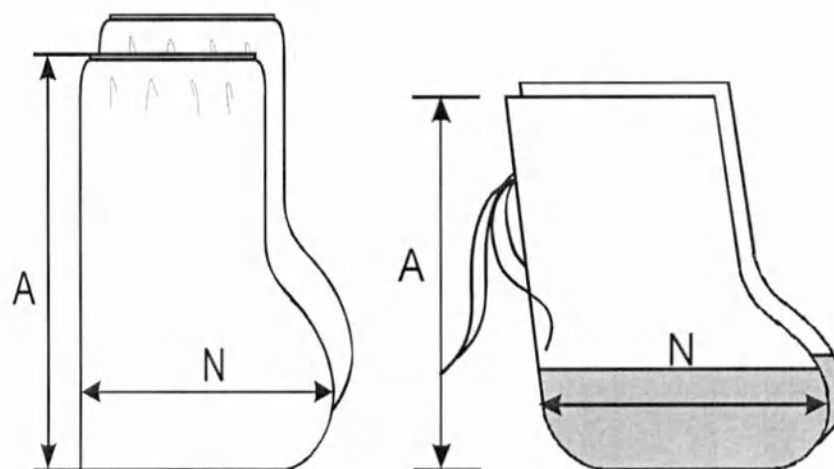


Рисунок 12. Чехол на конечности пациента. Обозначение «Барьер 9398.002.12».

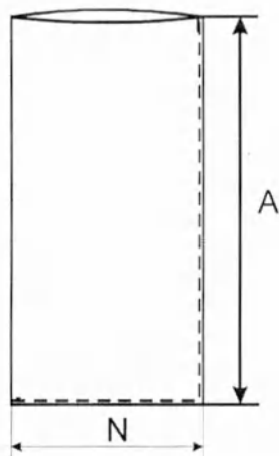


Рисунок 13. Нарукавники. Обозначение «Барьер 9398.002.13».

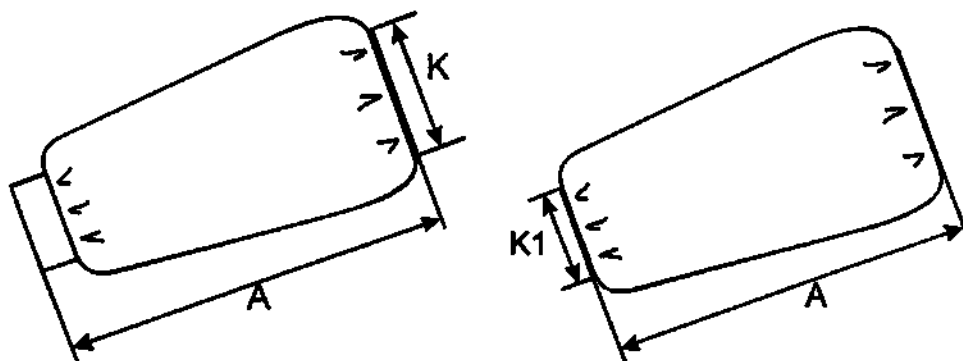


Рисунок 14. Рубашка для роженицы (для пациента). Обозначение «Барьер 9398.002.14».

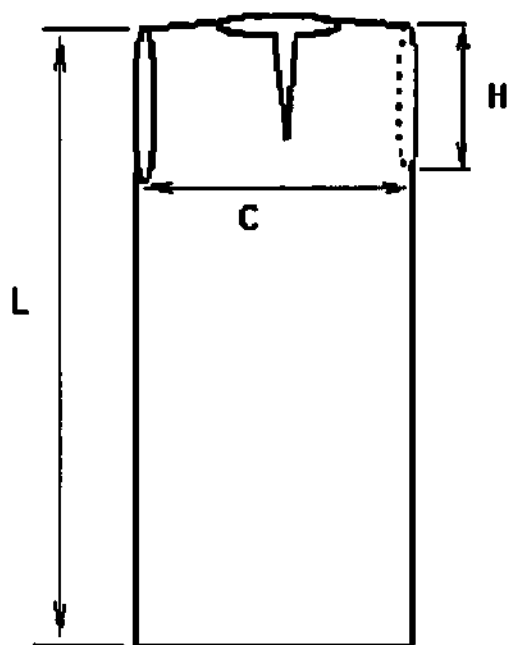


Рисунок 15. Рубашка для новорожденного. Обозначение «Барьер 9398.002.15».

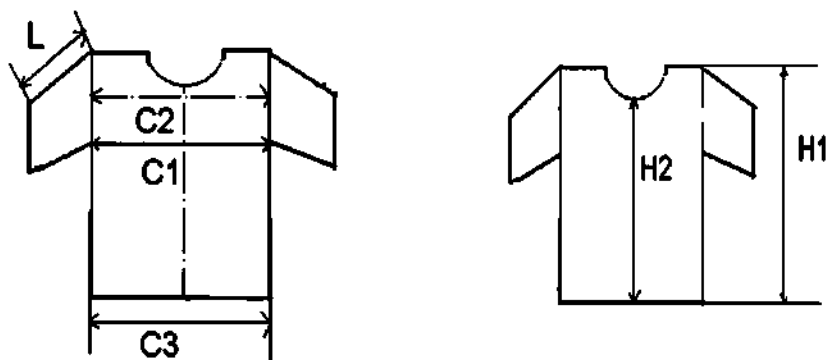


Рисунок 16. Трусики процедурные. Обозначение «Барьер 9398.002.16».

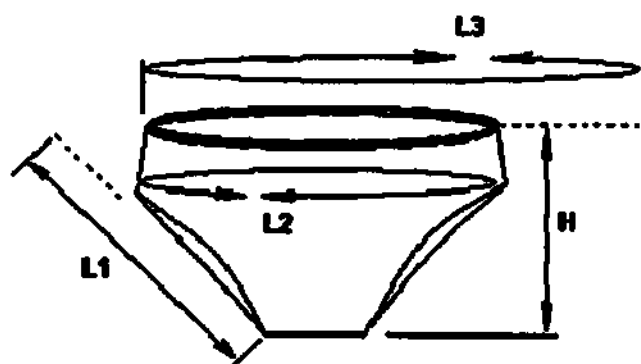


Рисунок 17. Накидка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.17».

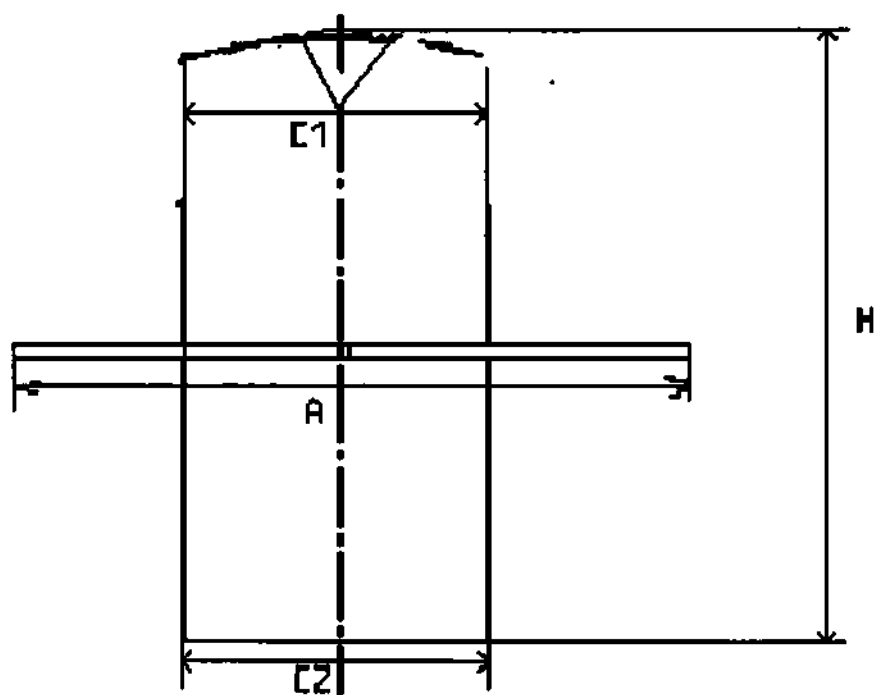


Рисунок 18. Простыня медицинская влагонепроницаемая. Обозначение «Барьер 9398.002.18».

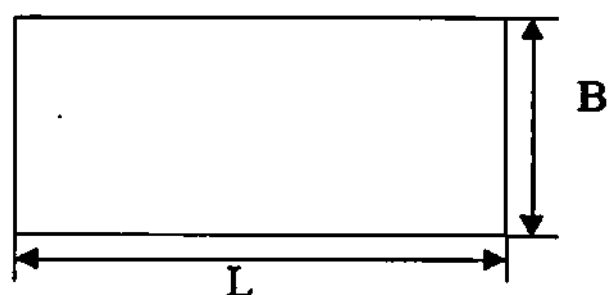


Рисунок 19. Пододеяльник. Обозначение «Барьер 9398.002.19».

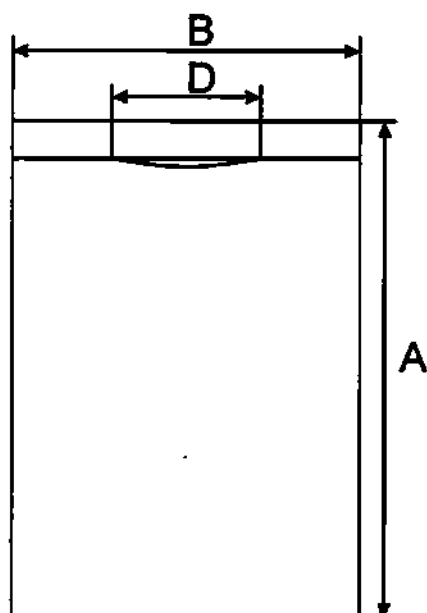


Рисунок 20. Наволочка. Обозначение «Барьер 9398.002.20».

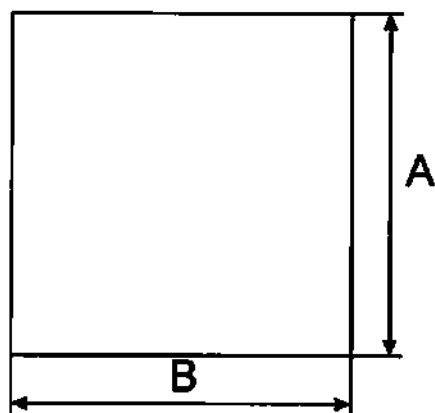


Рисунок 21. Наматрачник. Обозначение «Барьер 9398.002.21».

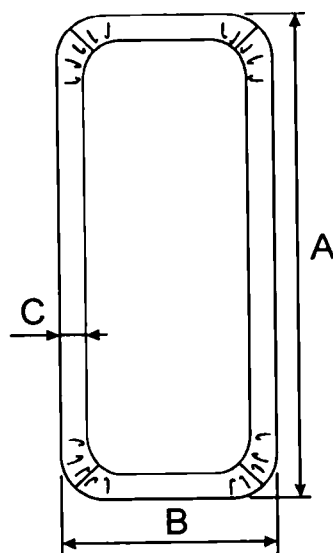


Рисунок 22. Простыня медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.22».

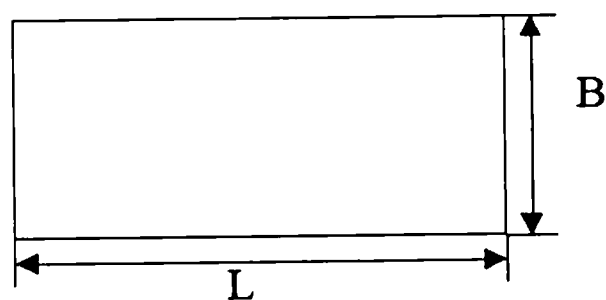


Рисунок 23. Чехол на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.002.23».
Чехол на медоборудование. Обозначение «Барьер 9398.002.24».

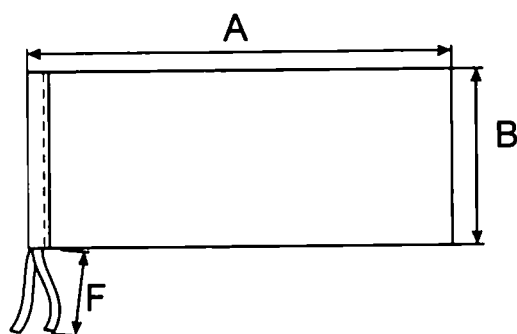


Рисунок 24. Мешок медицинский защитный. Обозначение «Барьер 9398.002.25».

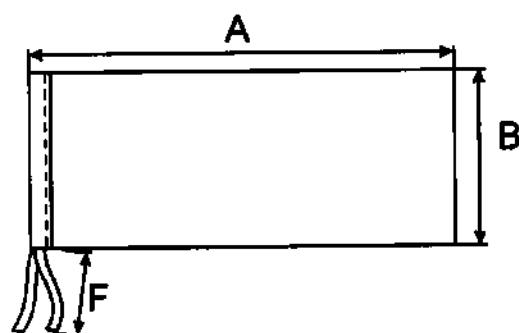


Рисунок 25. Конверт для новорожденного Обозначение «Барьер 9398.002.26»

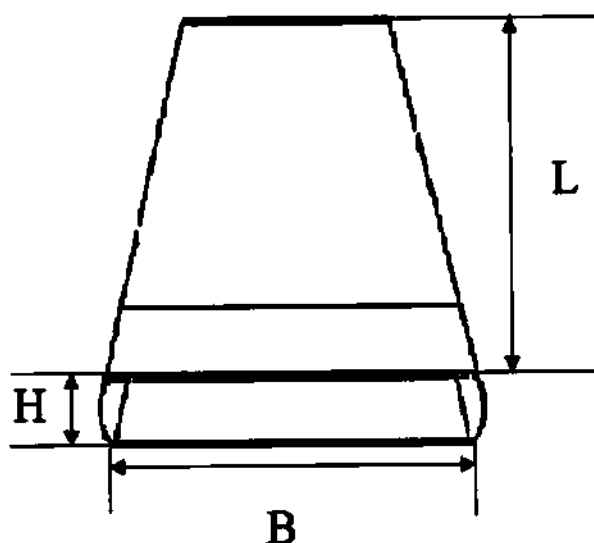


Рисунок 26. Салфетка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.002.27».

Салфетка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.28».

Покрывало на оборудование Обозначение «Барьер 9398.002.29».

Пеленка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.002.30».

Пеленка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.31».

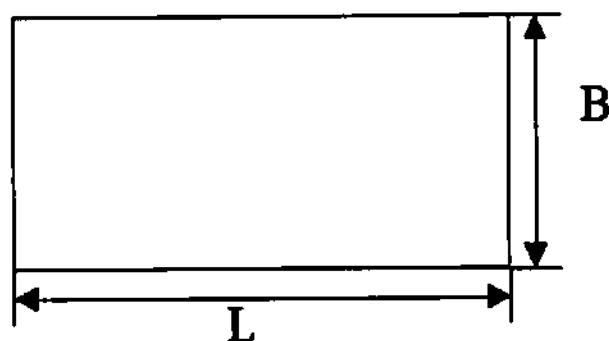


Рисунок 27. Карман-приемник. Обозначение «Барьер 9398.002.32».

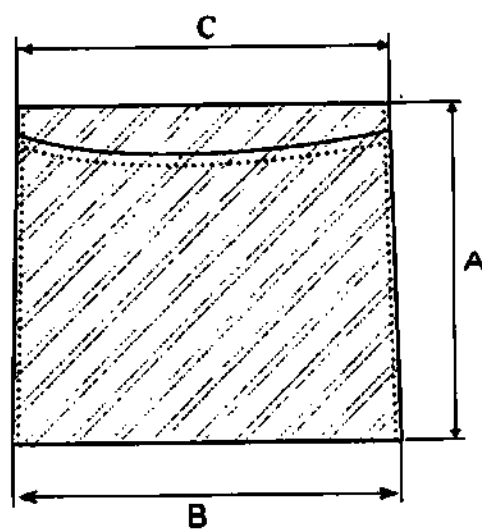


Рисунок 28. Тапочки медицинские. Обозначение «Барьер 9398.002.33».

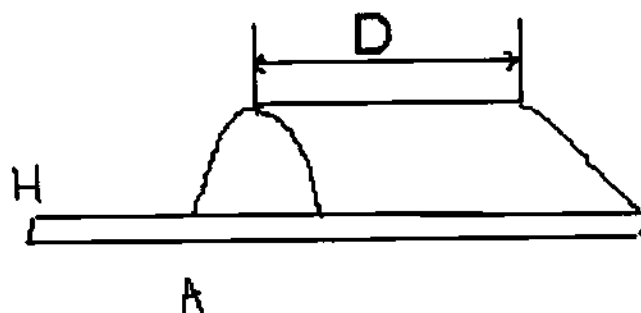


Рисунок 29. Валик для процедур. Обозначение «Барьер 9398.002.34».

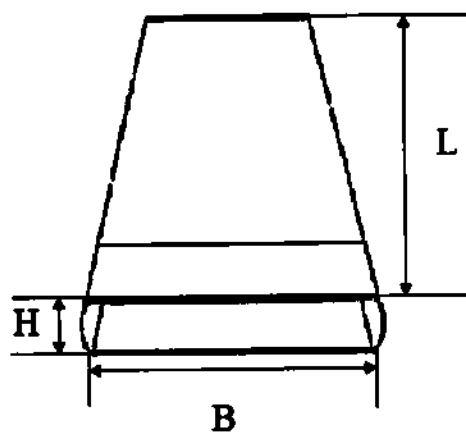


Рисунок 30. Простыня на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.002.35».



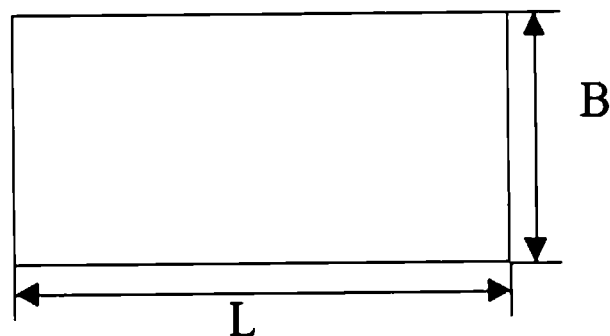


Рисунок 31. Маска медицинская

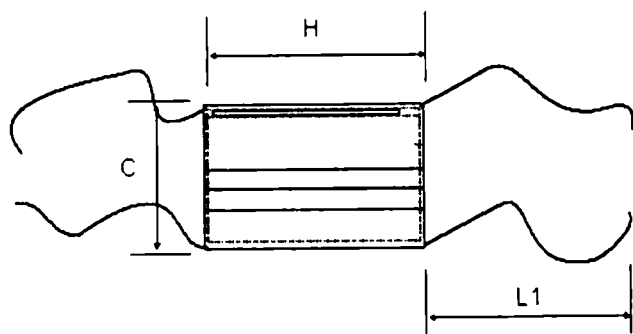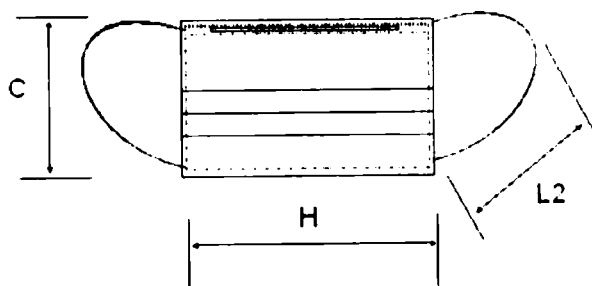

17.4. Основные линейные размеры изделий должны соответствовать обозначению «Барьер 9398.002.XX» и требованиям, представленным в таблицах 1 – 36.

Таблица 1 (к рисунку 1).

Халат медицинский (с усиленной защитной зоной, т.е. - ламинированный перед халата и рукава, или без нее). Обозначение «Барьер 9398.002.01».

Размер	Длина изделия (A), см	Ширина изделия (B), см	Длина защитной зоны (D), см (при наличии)	Длина рукава (C), см	Длина защитной зоны рукава (G), см (при наличии)	Ширина рукава внизу (K), см	Длина завязок (F), см
40-46	110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0	60,0±5,0	95,0±10,0	62,0±5,0	42,0±4,0	18,0±2,0	не менее 60,0
48-54		68,0±5,0	115,0±10,0				
56-62		76,0±5,0	135,0±10,0				
64-70		84,0±5,0					

Таблица 2 (к рисунку 2).

Куртка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.002.02».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина длинного рукава внизу (К), см
			длинного	короткого	
40-46	80,0±5,0	60,0±5,0	62,0±5,0	30,0±3,0	18,0±2,0
48-54		68,0±5,0			
56-62		76,0±5,0			
64-70		84,0±5,0			

Таблица 3 (к рисунку 3).

Брюки хирургические. Обозначение «Барьер 9398.002.03».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (Н), см
40-46	110,0±10,0	50,0±5,0	85,0±5,0	30,0±3,0
48-54		58,0±5,0		
56-62		66,0±5,0		
64-70		74,0±5,0		

Таблица 4 (к рисунку 4).

Комбинезон. Обозначение «Барьер 9398.002.04».

Длина изделия (от шеи до голеностопного сустава) (Н1), см	180,0 ± 10,0
Длина переда от середины горловины до промежности (Н 2), см	85,0 ± 5,0
Длина по шаговому шву (Н 3), см	85,0 ± 5,0
Ширина переда на уровне глубины проймы (С 1), см	82,0 ± 5,0
Ширина спинки (С 2), см	84,0 ± 5,0
Ширина в талии (С 3), см	82,0 ± 5,0
Ширина внизу (С 4), см	33,0 ± 3,0
Длина рукава от высокой точки оката до низа (L1), см	83,0 ± 5,0
Высота стенки капюшона (Н4), см (при наличии)	40,0 ± 4,0
Длина внутренней окружности капюшона (L2), см (при наличии)	54,0 ± 5,0

Таблица 5 (к рисунку 5).

Фартук хирургический защитный Обозначение «Барьер 9398.002.05».

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина завязок (F), см
100,0±10,0 130,0±10,0	80,0±5,0	не менее 40,0
	88,0±5,0	
	96,0±5,0	
	104,0±10,0	

Таблица 6 (к рисунку 6).

Шапочка «Колпак». Обозначение «Барьер 9398.002.06».

Высота изделия (Н), см	Длина внутренней окружности (L_1), см	Длина завязок (L_2), см	Диаметр доньшка (D), см
16,0±2,0 20,0±2,0 26,0±2,0	58,0±5,0	25,0 ± 0,5	20,0±2,0

Таблица 7 (к рисунку 7).

Шапочка «Берет». Обозначение «Барьер 9398.002.07».

Высота изделия (А), см	Длина внутренней окружности (О), см	Диаметр доньшка (L), см
15,0±2,0	60,0±5,0	30,0 ± 0,5

Таблица 8 (к рисунку 8).

Шапочка «Шлем». Обозначение «Барьер 9398.002.08».

Высота стенки (Н), см	Длина внутренней окружности (L_1), см	Длина завязок (L_2), см
33,0 ± 3,0	94,0 ± 5,0	не менее 70,0

Таблица 9 (к рисунку 9).

Шапочка «Шапочка для новорожденного». Обозначение «Барьер 9398.002.09».

Высота изделия (А), см	Длина завязок (F), см
12,0 ± 1,0	не менее 15,0

Таблица 10 (к рисунку 10).

Бахилы хирургические низкие. Обозначение «Барьер 9398.002.10».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см
15,0±1,0	36,0±3,0
7,0±0,5	10,0±0,5

Таблица 11 (к рисунку 11).

Бахилы хирургические высокие. Обозначение «Барьер 9398.002.11».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см	Длина завязок (при наличии) (K), см
40,0±5,0	36,0±3,0	40,0±10,0
50,0±5,0		

Таблица 12 (к рисунку 12).

Чехол на конечности пациента. Обозначение «Барьер 9398.002.12».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см
50,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0 70,0 ± 5,0
70,0 ± 5,0	
90,0 ± 5,0	
120,0 ± 10,0	
140,0 ± 10,0	

Таблица 13 (к рисунку 13).

Нарукавники. Обозначение «Барьер 9398.002.13».

Длина изделия (А), см	Ширина изделия в верхней части (К), см	Ширина изделия в области манжета (К1), см
50,0±5,0	25,0±2,0	17,0±2,0

Таблица 14 (к рисунку 14).

Рубашка для роженицы (для пациента). Обозначение «Барьер 9398.002.14».

Длина переда от середины горловины до низа (L), см;	100,0 ± 1,0
Высота проймы рукава (Н), см;	34,0 ± 1,0
Ширина на уровне глубины проймы (С), см.	72,0 ± 2,0

Таблица 15 (к рисунку 15).

Рубашка для новорожденного. Обозначение «Барьер 9398.002.15».

Длина спинки рубашки (Н1), см	30,0 ± 1,0
Длина переда рубашки от горловины до низа (Н2), см	20,0 ± 1,0
Длина рукава рубашки от горловины (L), см	20,0 ± 0,5
Ширина переда рубашки на уровне глубины проймы (С1), см	28,0 ± 1,0
Ширина спинки рубашки (С2), см	28,0 ± 1,0
Ширина рубашки снизу (С3), см	28,0 ± 1,0

Таблица 16 (к рисунку 16).

Трусики процедурные. Обозначение «Барьер 9398.002.16».

Высота (Н), см	36,0 ± 1,0
½ длины на бедре при растянутой резинке (L1), см	52,0 ± 1,0
Длина внутренней окружности (L 2), см	79,0 ± 1,0
Длина талии при растянутой резинке (L3), см	82,0 ± 1,0

Таблица 17 (к рисунку 17).

Накидка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.17».

Наименование показателя	Размеры	
Длина переда от середины горловины до низа (Н), см	140,0 ± 10,0	95,0 ± 5,0
Ширина на уровне глубины проймы (С1), см	170,0 ± 10,0	145,0 ± 10,0
Ширина внизу (С2), см	168,0 ± 10,0	143,0 ± 10,0
Длина пояса (А), см	70,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0

Таблица 18 (к рисунку 18)

Простыня медицинская влагонепроницаемая. Обозначение «Барьер 9398.002.18».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 19 (к рисунку 19)

Пододеяльник. Обозначение «Барьер 9398.002.19».

Длина пододеяльника (A), см	Ширина пододеяльника (B), см	Ширина входа в пододеяльник (D), см
90,0±5,0	50,0±5,0 70,0±5,0 90,0±5,0 110,0±10,0	30,0±3,0 50,0±5,0
110,0±10,0		
130,0±10,0		
150,0±10,0		
170,0±10,0		
190,0±10,0		
210,0±10,0		
230,0±10,0		
250,0±10,0		
270,0±10,0		

Таблица 20 (к рисунку 20)

Наволочка. Обозначение «Барьер 9398.002.20».

Длина наволочки (A), см	Ширина наволочки (B), см
10,0±1,0	10,0±1,0
20,0±2,0	20,0±2,0
30,0±3,0	30,0±3,0
40,0±4,0	40,0±4,0
50,0±5,0	50,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0

Таблица 21 (к рисунку 21)

Наматрачник. Обозначение «Барьер 9398.002.21».

Длина наматрачника (A), см	Ширина наматрачника (B), см	Ширина стенки наматрачника (C), см
90,0±5,0	50,0±5,0	10,0±1,0 20,0±2,0 30,0±3,0 40,0±4,0 50,0±5,0
110,0±10,0	70,0±5,0	
130,0±10,0	90,0±5,0	
150,0±10,0	110,0±10,0	
170,0±10,0	130,0±10,0	
190,0±10,0	150,0±10,0	
210,0±10,0	170,0±10,0	

Таблица 22 (к рисунку 22)

Простыня медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.22».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 23 (к рисунку 23)

Чехол на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.002.23».

Длина чехла (A), см	Ширина чехла (B), см	Длина завязок (F), см (при наличии)
90,0±5,0	60,0±5,0	не менее 30,0
100,0±10,0	70,0±5,0	
130,0±10,0	90,0±5,0	
140,0±10,0	80,0±5,0	
160,0±10,0	90,0±5,0	

Таблица 24 (к рисунку 23)

Чехол на медоборудование. Обозначение «Барьер 9398.002.24».

Длина чехла (A), см	Ширина чехла (B), см	Длина завязок (F), см
15,0±2,0	15,0±2,0 25,0±2,0 35,0±3,0 45,0±5,0 55,0±5,0 65,0±5,0 75,0±5,0 85,0±5,0 55,0±5,0 65,0±5,0 75,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±10,0 65,0±5,0 75,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±10,0	не менее 30,0
25,0±2,0		
35,0±3,0		
45,0±5,0		
55,0±5,0		
65,0±5,0		
75,0±5,0		
85,0±5,0		
100,0±10,0		
140,0±10,0		
150,0±10,0		
170,0±10,0		
190,0±10,0		
210,0±10,0		
230,0±10,0		
250,0±10,0		
270,0±10,0		
320,0±10,0		

Таблица 25 (к рисунку 24)

Мешок медицинский защитный. Обозначение «Барьер 9398.002.25».

Длина мешка (А), см	Ширина мешка (В), см
50,0±5,0	30,0±3,0
70,0±5,0	50,0±5,0
90,0±5,0	70,0±5,0
110,0±10,0	90,0±5,0
130,0±10,0	110,0±10,0
150,0±10,0	130,0±10,0
170,0±10,0	150,0±10,0
190,0±10,0	110,0±10,0
210,0±10,0	130,0±10,0
230,0±10,0	150,0±10,0
250,0±10,0	170,0±10,0

Таблица 26 (к рисунку 25)

Конверт для новорожденного Обозначение «Барьер 9398.002.26 ».

Наименование показателя	Размеры	
Длина изделия (L), см	70,0 ± 5,0	40,0 ± 2,0
Ширина изделия (В), см	40,0 ± 5,0	30,0 ± 2,0
Высота изделия (Н), см	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5

Таблица 27 (к рисунку 26).

Салфетка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.002.27».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (В), см
35,0±5,0	35,0±5,0
40,0±5,0	40,0±5,0
45,0±5,0	45,0±5,0
50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0

Таблица 28 (к рисунку 26).

Салфетка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.28».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (В), см
35,0±5,0	35,0±5,0
40,0±5,0	40,0±5,0
45,0±5,0	45,0±5,0
50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0

Таблица 29 (к рисунку 26).

Покрывало на оборудование. Обозначение «Барьер 9398.002.29»

Наименование показателя	Размеры		
Длина покрывала (L), см	320,0 ± 10,0	180 ± 10,0	210,0 ± 10,0
Ширина покрывала (В), см	200,0 ± 10,0	100,0 ± 10,0	140,0 ± 10,0

Таблица 30 (к рисунку 26).

Пеленка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.002.30».

Наименование показателя	Размеры			
Длина пеленки (L), см	60,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0	60,0 ± 5,0	180,0 ± 10,0
Ширина пеленки (B), см	60,0 ± 5,0	60,0 ± 5,0	40,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0

Таблица 31 (к рисунку 26).

Пеленка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.002.31»

Наименование показателя	Размеры			
Длина пеленки (L), см	60,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0	60,0 ± 5,0	180,0 ± 10,0
Ширина пеленки (B), см	60,0 ± 5,0	60,0 ± 5,0	40,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0

Таблица 32 (к рисунку 27).

Карман-приемник. Обозначение «Барьер 9398.002.32»

Длина кармана (A), см	Ширина кармана внизу (B), см	Ширина кармана вверху (C), см
20,0±5,0	20,0±5,0	10,0±5,0
30,0±5,0	30,0±5,0	20,0±5,0
40,0±5,0	40,0±5,0	30,0±5,0
50,0±10,0	50,0±5,0	40,0±5,0
70,0±10,0	60,0±5,0	50,0±5,0
90,0±10,0	70,0±5,0	60,0±5,0
110,0±10,0	80,0±5,0	70,0±5,0

Таблица 33 (к рисунку 28)

Тапочки медицинские. Обозначение «Барьер 9398.002.33».

Наименование показателя	Размер
Высота подошвы (H), см.	1,0 ± 0,5
Диаметр, при растянутой резинке (D), см.	25,0 ± 1,0
Длина подошвы (A), см.	40,0 ± 2,0

Таблица 34 (к рисунку 30)

Валик для процедур. Обозначение «Барьер 9398.002.34».

Наименование показателя	Размеры	
Длина изделия (L), см	30,0 ± 10,0	90,0 ± 10,0
Ширина изделия (B), см	15,0 ± 5,0	40,0 ± 10,0
Высота изделия (H), см	10,0 ± 0,5	20,0 ± 0,5

Таблица 35 (к рисунку 30)

Простыня на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.002.35».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 36 (к рисунку 31)

Маска медицинская

Длина маски (H), см	17,5 ± 1,5; 19,5 ± 1,5
Ширина маски (C), см	7,5 ± 0,5; 9,5 ± 0,5
Длина завязок (при наличии) (L 1), см	42,0 ± 4,0
Длина резинок в растянутом состоянии (при наличии) (L 2), см	не менее 30,0

17.5. Комплекты и отдельные изделия должны изготавливаться из материалов, представленных в таблице 37.

Таблица 37.

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность 20±5 г/м ²	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия; ТУ 2282-001-72716572-2013	Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Шапочка («Колпак», «Шапочка для новорожденного»); Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Накидка медицинская; Простыня медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на медоборудование; Куртка хирургическая; Трусики процедурные; Салфетка медицинская; Покрывало на оборудование; Пеленка медицинская; Брюки хирургические.
2. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность 50±10 г/м ²	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия; ТУ 2282-001-72716572-2013	Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Куртка хирургическая; Брюки хирургические; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шлем»); Бахилы хирургические (высокие, низкие);

		Чехол на конечности пациента; Нарукавники; Рубашка для роженицы (для пациента); Трусики процедурные; Накидка медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Простыня медицинская; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Салфетка медицинская; Покрывало на оборудование; Пеленка медицинская; Карман-приемник; Конверт для новорожденного (внешний слой); Валик для процедур (внешний слой)
3. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мелт-спан»), плотность $80 \pm 10 \text{ г/м}^2$	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия; ТУ 2282-001-72716572-2013	Мешок медицинский защитный; Тапочки медицинские; Наматрачник;
4. Спанлейс (материал нетканый) плотность $40 \pm 5 \text{ г/м}^2$	ООО «Авангард», Россия; ТУ 8390-003-56176857-2007	Куртка хирургическая; Брюки хирургические; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шапочка для новорожденного»); Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Салфетка впитывающая; Пеленка впитывающая; Пододеяльник; Наволочка; Простыня медицинская;
5. Спанлейс (материал нетканый) плотность $50 \pm 10 \text{ г/м}^2$	ООО «Авангард», Россия; ТУ 8390-003-56176857-2007	Конверт для новорожденного (внутренний слой); Валик для процедур (внутренний слой)
6. Вуденпалп (материал нетканый), плотность $65 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат хирургический без усиленной защитной зоны; Комбинезон; Куртка хирургическая; Нарукавники; Чехол на конечности пациента; Брюки хирургические
7. Ламинированный Спанбонд (материал нетканый), плотность $0 \pm 10 \text{ г/м}^2$	ООО «КЗНМ», Россия; ТУ 8390-002-71242729-2005	Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Нарукавники; Комбинезон; Наматрачник; Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Чехол на медоборудование;
8. Ламинированный Спанбонд (материал нетканый), плотность $50 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Фартук хирургический защитный; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Мешок медицинский защитный; Покрывало на оборудование; Карман-приемник; Простыня на инструментальный столик

9. Ламинированный спанлейс (материал нетканый), плотность $65 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Салфетка медицинская; Карман-приемник; Пеленка медицинская; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование
9. «Сантейс» (материал нетканый) плотность $65 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Салфетка медицинская; Карман-приемник; Пеленка медицинская; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование
10. Полотно трикотажное из хлопчатобумажной пряжи (100%).	Изготовитель: «UNVER TEXTIL KONFEKSIYON IMALAT SANAFI VE TICARET LIMITED» Турция	Фиксирующий элемент (манжет): Халат хирургический без усиленной защитной зоны; Комбинезон; Куртка хирургическая; Нарукавники; Чехол на конечности пациента; Брюки хирургические.
11. Фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка))	ООО «ФИ-ТЕКС» по ТУ 8151-001-59722763-2004	Фиксирующий элемент (резинка): Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Брюки хирургические; Комбинезон; Куртка хирургическая; Наматрачник; Нарукавники; Трусики процедурные; Халат медицинский без усиленной защитной зоны; Халат медицинский с усиленной защитной зоной; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Шапочка «Берет»,
12. Синтепон (полотно нетканое термоскрепленное, из полиэфирных волокон (100%))	ООО «Сибирский синтепон» ТУ 8391-001-14765083-2003	Внутренний слой: 1. Конверт для новорожденного 2. Валик для процедур

17.6. Покупные изделия, должны соответствовать указанным в таблице 38.

Таблица 38.

Наименование покупных изделий.	Нормативный документ и предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1. Маска медицинская из нетканого материала одноразовая	ООО «МАСКА», Россия; ТУ 9398-001-64260744-2010 РУ №ФСР 2010/08512 (состав: спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен; фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	Маска медицинская

17.7. Материалы для изделий, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 39. Таблица 39.

Наименование материала.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупорность, мм в д. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении	
1	2	3	4	5	6	7
1. Неламинированный нетканый материал (СМС (спанмельт-спан), Спанлейс, Вуденпалп,)	15,0	2,0	1,5	1,8	1,2	-
	20,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-
	25,0	3,5	2,0	3,0	1,8	-
	35,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	40,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	45,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	50,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	55,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	60,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
	70,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
80,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-	
2. Ламинированный нетканый материал (Спанбонд, Спанлейс, Сантейс)	40,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	50,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	55,0	5,5	4,0	5,0	3,5	1000
	60,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	65,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	70,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	75,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000

Поглотительная способность впитывающих изделий (пеленки впитывающей; салфетки впитывающей) должна быть не менее 5 г/г.

17.8. Одежда и белье включает ассортимент следующих изделий: Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без нее); Куртка хирургическая; Брюки хирургические; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шлем», «Шапочка для новорожденного»), Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Наручники; Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Трусики процедурные; Накладка медицинская; Маска медицинская; Простыня медицинская влагонепроницаемая; Пододеяльник; Наволочка; Наматрачник; Простыня медицинская; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Мешок медицинский защитный; Конверт для новорожденного; Салфетка впитывающая; Салфетка

медицинская; Покрывало на оборудование; Пеленка впитывающая, Пеленка медицинская; Карман-приемник; Тапочки медицинские; Валик для процедур; Простыня на инструментальный столик.

Халат медицинский (с усиленной защитной зоной или без неё) должен быть свободного покроя. Тип рукава: втачной или реглан, длинный с вязанным трикотажным манжетом, на завязках или собранным на резинку. Тип горловины: круглый или V-образный вырез без воротника или с воротником-стойкой. Перед халата может быть на кокетке, включать складки, обеспечивающие свободу движения. Халат дополнительно может быть усилен ламинированным материалом как с внутренней стороны изделия, так и с лицевой. Горловина халата фиксируется на завязки. Халат должен фиксироваться сзади на 2-е или 4-е завязки или на пояс в области талии или спереди – на завязки. Низ халата не обработан.

Куртка хирургическая должна быть с коротким или длинным рукавом, собранным на резинку или с вязанным трикотажным манжетом. Полочка может быть с накладными карманами или без них. Спинка с кокеткой или без нее. Тип горловины: круглый или прямоугольный или V-образный, с планкой или без. Низ куртки не обработан.

Брюки хирургические должны быть свободного покроя. Верх брюк собран на резинку или завязки (кулиску), возможно наличие карманов спереди или сзади. Низ брюк собран на резинку или не обработан.

Комбинезон должен быть с длинным втачным рукавом, который оканчивается манжетой трикотажной или резинкой. Перед цельнокроеный, спинка должна быть цельнокроеная. Вырез горловины должен быть округлый. Комбинезон может иметь притачанный капюшон с резинкой или кулисой по краю. При разрезной передней полочке застежка на завязки. Комбинезон может на уровне талии фиксироваться резинкой или завязками.

Фартук хирургический защитный должен быть фигурным, цельнокроеным, с двумя завязками на уровне талии, лямкой или завязками, фиксирующей его на шее. Края не обработаны.

Шапочка «Колпак» должна быть цилиндрической формы, с подворотом или без, состоять из стенки и доньшка круглой или овальной формы, с обработанными краями или без. Шапочка фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер колпака.

Шапочка «Берет» должна быть собрана на резинку по краю вдоль окружности. Края могут быть не обработаны.

Шапочка «Шлем» должна состоять из стенки с доньшком, завязок для плотной фиксации на шее или с плечевым покрытием на завязке. Края могут быть не обработаны.

Шапочка «Шапочка для новорожденного» должна состоять из 2-х сшитых между собой частей овальной формы и фиксироваться спереди на завязки. Края могут быть не обработаны.

Бахилы хирургические высокие могут быть с одинарной или двойной ламинированной подошвой или без нее, собраны по верхнему краю на резинку или на завязки (кулиску). Могут фиксироваться на 4-е завязки или без.

Бахилы хирургические низкие должны быть собраны по верхнему краю или по центру на резинку. Края не обработаны.

Чехол на конечности пациента должен быть одношовным, собранным по верхнему краю на манжету или резинку. Края не обработаны.

Нарукавники должны быть одношовными, верх и низ собран на резинку или на завязки или низ с вязанными трикотажными манжетами. Края не обработаны.

Рубашка для роженицы (для пациента) должна быть свободного покроя, прямого или расширенного к низу силуэта, с коротким цельнокроеным рукавом или без него. Передняя часть может быть на кокетке. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: с разрезом на завязки. Края могут быть не обработаны.

Рубашка для новорожденного должна быть свободного покроя, с длинным цельнокроеным рукавом. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: спереди или сзади рубашка может фиксироваться на завязки. Края могут быть не обработаны.

Трусики процедурные на уровне талии собраны на резинку или фиксируются при помощи завязок. Низ трусов собран на резинку или не обработан.

Накидка медицинская должна быть без воротника, с увеличенной проймой для свободного движения, без рукавов. Полочка должна быть цельнокроеной со спинкой или состоять из 2-х половинок. Может фиксироваться завязками. Низ накидки не обработан.

Пододдеяльник и наволочка представляют собой сшивные изделия прямоугольной или квадратной формы. Края могут быть обработаны и не обработаны

Наматрачник должен быть прямоугольной формы с бортиком или без, фиксироваться при помощи резинки или на завязки.

Простыня медицинская, простыня медицинская влагонепроницаемая и простыня на инструментальный столик должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны.

Чехол на инструментальный столик должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

Чехол на медоборудование должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

Мешок медицинский защитный должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках.

Конверт для новорожденного должен быть прямоугольной формы. Состоит из двух частей, сшитых по краям и низу, верхний край открыт. Внутренний слой из синтепона.

Салфетка впитывающая, Пеленка впитывающая, представляют собой прямоугольные цельнокроеные однослойные изделия с необработанными, не осыпающимися краями.

Салфетка медицинская, Покрывало на оборудование, Пеленка медицинская должны быть прямоугольной формы, цельнокроеные, края не обработаны.

Тапочки медицинские должны быть с открытым или закрытым носком, состоять из подошвы и верхней части. Края могут быть не обработаны.

Валик для процедур представляет собой сшивное изделие прямоугольной или овальной формы. Внутренний слой из синтепона. Края могут быть обработаны и не обработаны

Карман-приемник может быть квадратной, прямоугольной или трапециевидной формы, 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный, Края не обработаны.

Маска медицинская, 3-х слойная, может быть на завязках или резинках, с обработанными краями или без. Маска оснащена фиксатором.

18 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда и белье могут применяться в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах (кроме инфекционных, кожно-венерологических, микологических, реанимационных отделений, операционных блоков), в социальных учреждениях.

19 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту

20 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

21 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации изделия должны быть нетоксичными и не вызывать местно-раздражающих и аллергических эффектов при контакте с неповрежденной кожей.

Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека.

Все работы по их производству должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией. Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Условия труда работающих – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием.

При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Охрана окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.01.

Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

22 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На территории Российской Федерации по вопросам, касающимся качества изделий: Одежда и

белье медицинские одноразовые нестерильные «БАРЬЕР» в комплектах и отдельных упаковках

обращаться по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Барьер»

Юридический адрес: РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Гурзуфская,12,оф.6/3, телефон: (343)228-37-43, факс: (343)228-37-43, e-mail:
sg@barier.info.

Адрес места производства:

РФ, Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Александра Невского, 4

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

33 (Приказ) листов

Директор ООО «ПП «Барьер»

Будлянский Г.В.

