

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «Барьер»

Г.В.Будлянский

«28» июня 2024г.

Инструкция по применению медицинского изделия

*Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур
одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016,
производства ООО «ПП «Барьер», Россия*

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для применения как медицинские изделия для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи в терапевтических, акушерских, гинекологических, хирургических, офтальмологических, инфекционных, педиатрических отделениях, процедурных и перевязочных кабинетах, в отделениях гемодиализа, трансфузиологии и гематологии. Комплекты могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для применения как медицинские изделия для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи в терапевтических, акушерских, гинекологических, хирургических, офтальмологических, инфекционных, педиатрических отделениях, процедурных и перевязочных кабинетах, в отделениях гемодиализа, трансфузиологии и гематологии.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав материалов, применяемых для изготовления медицинского изделия

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект выпускается стерильным. Стерилизация осуществляется газовым способом (оксидом этилена) по ГОСТ ISO 11135-2017. Перед эксплуатацией медицинского изделия ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Перед использованием по назначению стерильный комплект освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки.

Запрещается использовать стерильный комплект в следующих случаях:

- если истек срок годности данной партии
- если нарушена целостность упаковки
- если упаковка находится во влажном состоянии

При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Побочных действий при использовании данного изделия не выявлены.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Медицинское изделие «Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016» совместимо со всеми медицинскими изделиями.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Особенностей применения при использовании данного медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, для беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания не выявлено.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Влияние данного медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводилось, так как изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомотормное состояние человека

10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Перед эксплуатацией медицинского изделия ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Варианты исполнения медицинского изделия «Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016» имеют одно назначение и область медицинского применения:

Предназначены для применения как медицинские изделия для медицинского персонала и пациентов, в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций, при оказании лечебно-профилактической помощи в терапевтических, акушерских, гинекологических, хирургических, офтальмологических, инфекционных, педиатрических отделениях, процедурных и перевязочных кабинетах, в отделениях гемодиализа, трансфузиологии и гематологии.

Время использования Комплектов:

- в течение времени проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций.

Перед использованием по назначению стерильный комплект освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки. При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования

Порядок применения вариантов исполнения медицинского изделия «Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» в зависимости от техники и объема проведения хирургических манипуляций и процедур.

10.1. Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер» применяется для хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, перевязок, постановки катетера. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции. Комплект вскрывается медсестрой:

Пеленка впитывающая и/или Пеленка впитывающая «Медмилт», «Seni» применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского оборудования для сохранения стерильности, подкладывается под тело или руку пациента для ограничения распространения биологических жидкостей и по потребности используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Пеленка медицинская применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, медицинского оборудования для сохранения стерильности и по потребности используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Фиксирующий лейкопластырь для фиксации повязок, тампонов, катетеров при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Салфетка впитывающая применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, диагностических манипуляций;

Салфетка марлевая применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, диагностических манипуляций;

Салфетка медицинская применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского оборудования и инструментов для сохранения стерильности и по потребности используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Салфетка с разрезом применяется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур: заводится по катетер с целью последующей устойчивой фиксации;

Тампон впитывающий применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций;

Тампон марлевый применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций;

Бинт марлевый медицинский применяется для фиксации повязок, тампонов, катетеров при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Бинт самофиксирующийся применяется для фиксации повязок, тампонов, катетеров при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Лоток полимерный применяется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур: промывания дренажных трубок, катетеризаций, пункций, перевязок, и т.д., для сбора перевязочного материала, для размещения инструментов и других медицинских изделий;

Маска медицинская 3-х слойная; одевается медперсоналом или пациентами, время использования одноразовой медицинской маски составляет 3 часа, нельзя касаться закрепленной на лице маски, после снятия использованной маски нужно тщательно мыть руки с мылом, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос;

Перчатки хирургические или Перчатки смотровые применяются при проведении хирургических манипуляций и процедур защищают руки медицинского персонала;

Пинцет полимерный предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций

Повязка применяется для перевязки и стерильной обработке ран при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Шприц используется при установке и обработке катетера применяемого в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, перевязок и по потребности;

Бандаж гемостатический накладывается на место прокола после того, как была изъята фистульная игла или катетер для эффективной остановки кровотечения за счет разбухания губки из целлюлозы

Колпачок (заглушка) используется в качестве заглушки в изделиях медицинского назначения имеющих коннектор "Луер" (ЦВК, ПВК и др.) обеспечивая их герметичность, стерильность и апиrogenность внутренней среды медицинских изделий при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Повязка для фиксации канюль применяется для фиксации катетеров и канюль к кожным покровам пациента при проведении хирургических манипуляций и процедур;

10.2. Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» применяется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции. Комплект вскрывается медсестрой;

Пеленка впитывающая и/или Пеленка впитывающая «Медмил», «Seni» применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского оборудования для сохранения стерильности, подкладывается под тело или руку пациента для ограничения распространения биологических жидкостей и по потребности используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Пеленка медицинская применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, медицинского оборудования для сохранения стерильности и по потребности используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Фиксирующий лейкопластырь для фиксации повязок, тампонов, катетеров, канюлей, зондов, трубок, других медицинских устройств, при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Пеленка с адгезивным слоем применяется как медицинское изделие для ограничения места установки катетера (и по потребности), фиксируется на теле пациента, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие, используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Полотенце применяется как впитывающий медицинский материал при обработке рук медицинского персонала;

Простыня с отверстием с адгезивным слоем применяется как медицинское изделие для ограничения места установки катетера (и по потребности), фиксируется на теле пациента, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие, используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Салфетка впитывающая применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, диагностических манипуляций;

Салфетка марлевая применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, диагностических манипуляций;

Салфетка медицинская применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского оборудования и инструментов для сохранения стерильности и по потребности используется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур;

Салфетка с разрезом применяется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур: заводится по катетер с целью последующей устойчивой фиксации;

Тампон впитывающий применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций

Тампон марлевый применяется в качестве впитывающего перевязочного материала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, плазмафереза, перевязок, обработки ран, анестезии, диагностических манипуляций;
 Бинт самофиксирующийся применяется для фиксации повязок, тампонов, катетеров;
 Лоток полимерный применяется в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур: промывания дренажных трубок, катетеризаций, пункций, перевязок, и т.д., для сбора перевязочного материала, для размещения инструментов и других медицинских изделий;
 Маска медицинская 3-х слойная; одевается медперсоналом или пациентами, время использования одноразовой медицинской маски составляет 3 часа, нельзя касаться закрепленной на лице маски, после снятия использованной маски нужно тщательно мыть руки с мылом, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос;

Перчатки хирургические или Перчатки смотровые применяются при проведении хирургических манипуляций и процедур защищают руки медицинского персонала;

Повязка применяется для перевязки и стерильной обработке ран при проведении хирургических манипуляций и процедур;

Шприц используется при установке и обработке катетера применяемого в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур, процедуры гемодиализа, перевязок и по потребности;

Колпачок (заглушка) используется в качестве заглушки в изделиях медицинского назначения имеющих коннектор "Луер" (ЦВК, ПВК и др.) обеспечивая их герметичность, стерильность и апиrogenность внутренней среды медицинских изделий

11. СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Изготовитель гарантирует соответствие качества Комплектов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок годности изделий - 5 лет со дня стерилизации.

Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта. Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем. Условия транспортирования - по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +50С до +400С.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

13. УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

14. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Не использованные медицинские изделия «Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016» специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

15. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Барьер»» (ООО «ПП «Барьер»)
 Юридический адрес: Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3, телефон/факс.(343) 228-37-43, e-mail: sg@barier.info. Адрес места производства: Россия, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Александра Невского,4

16. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят изделия в комплектах.

Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016:

Состав изделий в комплектах и их исполнение:

I. Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) в составе:	
одноразовый стерильный «Барьер».	
1	1.Пеленка впитывающая - не более 20 шт., варианты исполнения: 1.1. Пеленка впитывающая, длина x ширина в см: (20,0-190,0) x (20,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия. 1.2. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, производства ООО «Медмил», Россия, РУ № РЗН 2016/4992, варианты исполнения: 1.2.1. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Эконом, следующих типоразмеров 20x30 см, 20x60 см, 40x60 см, 60x60 см, 60x90 см, 60x120 см. 1.2.2. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Оптима, следующих типоразмеров 20x30 см, 20x60 см, 40x60 см, 60x60 см, 60x90 см, 60x120 см, 90x170 см с крыльями, 90x180 см с крыльями. 1.3. Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые "Seni", производства ООО "Белла", Россия, РУ № РЗН 2015/2475, варианты исполнения: 1.3.1. Пеленки Seni Soft: Seni Soft (40см x 60см, 60см x 60см, 90см x 60см, 90см x 170см с крыльями из нетканого материала). 1.3.2. Пеленки Seni Soft: Normal (60см x 60см, 90см x 60см). 1.3.3. Пеленки Seni Soft: Seni Soft Basic (40см x 60см, 60см x 60см, 90см x 60 см).
2	2. Пеленка медицинская, длина x ширина в см:(20,0-190,0)x(20,0-190,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 10шт.

3	3. Лейкопластырь фиксирующий нестерильный - не более 20 шт., варианты исполнения: 3.1. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, производства ООО "НПМ", Россия, РУ № ФСР 2007/00789, следующих исполнений: I Основа (подложка): нетканая. II. Размерный ряд, см: 3.1.1. нетканая основа (лейкопластырь в виде рулона намотанного без гильзы (катушки) или на картонную гильзу или пластмассовую катушку): - длина 1000,0 х ширина от 1,0 до 5,0 шаг 0,5; - длина 1000,0 х ширина свыше 5,0 до 30,0 шаг 1,0. 3.2. Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/01442, варианты исполнения: 3.2.1. на нетканой основе, пластырь-повязка NW рулонный, с впитывающей прокладкой и без нее, гипоаллергенный, размеры, см: 5х1000; 10х1000. 3.3. Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства «Фармлайн ООО», Чешская Республика, РУ № РЗН 2022/18988, в вариантах исполнения: На нетканой основе: 3.3.1. TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5х1000; 10х1000. 3.4. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производства "ФармЛайн Лимитед", Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959, Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. 3.5. Пластырь-повязка рулонный, фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт), производства ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, РУ № РЗН 2017/5942, варианты исполнения: 3.5.1. На нетканой основе: 5,0 см х 10, 0 м; 10,0 см х 10,0 м. 3.6. Пластырь медицинский фиксирующий, производства "БАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/07988, варианты исполнения: 3.6.1. Пластырь медицинский фиксирующий Крупofикс, размеры в см: - 5×1000, 10×1000. 3.7. Пластыри и повязки фиксирующие по ТУ 9393-004-61014306-2015, производства АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", Россия, РУ №РЗН 2016/3848, варианты исполнения: 3.7.1. повязка фиксирующая, гипоаллергенная, пластырного типа КРУПОФИКС следующих типоразмеров (см): 5х1000; 10х1000. 3.8. Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, производства "Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428, варианты исполнения: 3.8.1. Пластырь нетканый фиксирующий Omnifix® elastic/ Омнификс эластик (нестерильный), размеры: 10 м х 2,5 см, 10 м х 5 см, 10 м х 10 см. 3.9. Пластырь фиксирующий на катушках и в рулонах, нестерильный, производства "Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № РЗН 2023/21505, варианты исполнения: 3.9.1. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 5 см х 10 м - 1 шт. 3.9.2. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 10 см х 10 м - 1 шт. 3.9.3. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 2,5 см х 10 м - 2 шт
4	4. Салфетка впитывающая, длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50шт.
5	5. Салфетка марлевая, длина х ширина в см: (3,0-42,0)х(3,0-42,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50шт.
6	6. Салфетка медицинская (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 10шт.
7	7. Салфетка с разрезом, длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2 шт.
8	8. Тампон впитывающий прямоугольной, треугольной или круглой формы, длина х ширина в см: (2,4-9,5)х (2,4-9,5) или диаметром, см. (2,4-9,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50шт.
9	9. Тампон марлевый прямоугольной, треугольной или круглой формы, длина х ширина в см: (2,4-9,5)х (2,4-9,5) или диаметром, см. (2,4-9,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50шт;
10	10. Бинты марлевые медицинские стерильные - не более 2 шт., варианты исполнения: 10.1. Бинты марлевые медицинские стерильные (16-ти типоразмеров) и нестерильные (33-х типоразмеров) по ТУ 9393-001-32947348-2010: Бинты марлевые медицинские стерильные размеры 5 м х 10 см, 7 м х 10 см, 7мх14см, производства ООО «Ткацкая фабрика 2», Россия, РУ № ФСР 2011/10227. 10.2. Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, размеры 5 м х 10 см, 7 м х 10 см, 7м х14см, производства ООО "АПСАНА", Россия, РУ № ФСР 2008/03217. 10.3. Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: стерильные 5м х 10см, 7м х 14см, производства ООО "Элепром", Россия, РУ № ФСР 2012/14232. 10.4. Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, размеры 5 м х 10 см, 7м х14см производства ООО "ПКФ ВераМед", Россия РУ № ФСР 2008/03226. 10.5. Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 Следующих типоразмеров: 5м х 10см, 7м х 14 см, производства ООО "ХБК "Навтек", Россия, РУ №РЗН 2015/2552.
11	11. Бинт самофиксирующийся - не более 3шт., варианты исполнения: 11.1. Бинты эластичные фиксирующие самоприлипающие Matofix COHESIVE под товарным знаком matorat, размеры 15см х 4м, 12см х 4м, 10см х 4м, 8см х 4м, 6см х 4м, 15см х4,5м, 12см х4,5м, 10см х4,5м, 8см х 4,5м, 6см х4,5м, 15см х 5м, 12см х5м, 10см х5м, 8см х 5м, 6см х 5м., производства АО «Торуньске заклады материалув опатрунковых С.А.», Польша, РУ № ФСЗ 2012/11570. 11.2. Изделия медицинские эластичные компрессионные и фиксирующие: фиксирующие бинты эластичные, самофиксирующиеся: -Peha-haft (Пеха-хафт), размеры 4 м х 4 см, 4 м х 6 см, 4мх8см, 4мх10см, 4мх12см, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09638. 11.3. Бинт марлевый самофиксирующийся нестерильный «Кобинт» по ТУ 9393-007-74639918-2006, размеры: 4 м х 6 см,

	4мх8см, 4мх10см, 4мх12см, производства ООО «Новые Перевязочные Материалы», Россия, РУ № -ФСР 2007/00790. 11.4. Бинты эластичные фиксирующие медицинские по ТУ 21.20.24-001-83998195-2017, производства ООО "СМ-РосТ", Россия, РУ № РЗН 2017/6538, варианты исполнения: 11.4.1 - БЭФМ 60 мм х 4000 мм; - БЭФМ 80 мм х 4000 мм; - БЭФМ 100 мм х 4000 мм; - БЭФМ 120 мм х 4000 мм; - БЭФМ 150 мм х 4000 мм. 11.5. Бинт когезивный самофиксирующийся по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022, производства ООО "ХЕЛСЛАБ", Россия, РУ № РЗН 2023/21104, в вариантах исполнения: 11.5.1. TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса). Размер (длина в растянутом состоянии): 4 см × 4 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м. 11.6. Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся) по ТУ 9393-003-10715071-2017, производства ООО "ХБК "Навтекс", Россия, РУ № РЗН 2018/7444, варианты исполнения: 11.6.1. Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся) белые по ТУ 9393-003-10715071-2017, размером 4,0 м х 4,0 см; 4,0 м х 6,0 см; 4,0 м х 8,0 см; 4,0 м х 10,0 см; 4,0 м х 12,0 см; 5,0 м х 6,0 см; 5,0 м х 8,0 см; 5,0 м х 10,0 см; 5,0 м х 12,0 см.
12	12. Лотки полимерные почкообразные ЛП-«КМИЗ» (160мм и 260мм) производства ООО «Полимерные изделия» Россия, РУ № ФСР 2011/10604 не более 2 шт.
13	13. Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках - не более 7 шт., варианты исполнения: 13.1. Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные «ГЕКСА» по ТУ 9398-017-18603495-2010, производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ № ФСР 2010/09436, варианты исполнения: 13.1.1. Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на резинке, голубая); 13.1.2. Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на завязках, голубая). 13.2. Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08512. 13.3. Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-75756402-2020, производства ООО «МЕДИКА Е», Россия, РУ № РЗН 2020/10301. 13.4. Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673, варианты исполнения: 13.4.1. маска медицинская стандарт. 13.4.2. маска медицинская классик.
14	14. Перчатки - не более 7 пар, варианты исполнения: 14.1. Перчатки хирургические: 14.1.1. Перчатки латексные стерильные по ТУ 2514-001-50341858-2007, производства ООО «Жасмин Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00456, следующих исполнений: 14.1.1.1. Перчатки латексные хирургическими стерильные: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. 14.1.2. Перчатки хирургические и смотровые, производства "Веар Сейф (Малайзия) Сдн. Вхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185, вариант исполнения: 14.1.2.1. Перчатки латексные хирургические стерильные, размеры: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. 14.1.3. Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № ФСР 2011/12244, следующих типоразмеров: 14.1.3.1. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. 14.1.4. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benouy" стерильные и нестерильные, производства "ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/12488, вариант исполнения: 14.1.4.1. Перчатки хирургические латексные анатомические неопудренные стерильные, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. 14.1.5. Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства "Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220, вариант исполнения: 14.1.5.1. Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. 14.1.6. Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368, вариант исполнения: 14.1.6.1. перчатки латексные хирургические стерильные. 14.1.6.2. перчатки латексные хирургические нестерильные. 14.1.7. Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ №ФСР 2008/03089, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные стерильные, неопудренные. 14.2. Перчатки смотровые: 14.2.1. Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № ФСР 2011/12244, следующих типоразмеров: 14.2.1.1. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 14.2.1.2. Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 14.2.2. Перчатки латексные стерильные по ТУ 2514-001-50341858-2007, производства ООО «Жасмин Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00456, следующих исполнений: 14.2.2.1 Перчатки латексные смотровые стерильные: S(6-7), M(7-8), L(8-9). 14.2.3. Перчатки медицинские смотровые "Супермакс", латексные и нитриловые, производства "Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/02932, варианты исполнения: 14.2.3.1. Перчатки медицинские смотровые, латексные. 14.2.3.2. Перчатки медицинские смотровые, нитриловые. 14.2.4. Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой) размеры: XS, S, M, L, производства "Сарая Гигиена Малайзия Сдн. Бхд", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/11582. 14.2.5. Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства "Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220, варианты исполнения:

	14.2.5.1. Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - синий, белый, фиолетовый, размеры XS, S, M, L. 14.2.5.2. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. 14.2.6. Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства BPG Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6102, варианты исполнения: 14.2.6.1. Маленькие (S) 0-100 шт. 14.2.6.2. Средние (M) 0-100 шт. 14.2.6.3. Большие (L) 0-100 шт. 14.2.7. Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства "BPG Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6105, варианты исполнения: 14.2.7.1 Маленькие (S) 0-100 шт. 14.2.7.2 Средние (M) 0-100 шт. 14.2.7.3 Большие (L) 0-100 шт. 14.2.8. Перчатки медицинские, производства «Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)», Малазия, РУ № ФСЗ 2011/10210, вариант исполнения: 14.2.8.1. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy», цвет: бирюзовый, синий, белый, голубой, зеленый, сиреневый, размеры: XS, S, M, L. 14.2.8.2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy», цвет: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L. 14.2.9. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benovy" стерильные и нестерильные, производства "ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малазия, РУ № ФСЗ 2012/12488, варианты исполнения: 14.2.9.1. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L. 14.2.9.2. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые, цвета: бирюзовый, синий, белый, голубой, сиреневый, зеленый, размеры: XS, S, M, L. 14.2.10. Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368, варианты исполнения: 14.2.10.1. перчатки латексные смотровые диагностические стерильные. 14.2.10.2. перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные. 14.2.10.3. перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные. 14.2.10.4. перчатки синтетические смотровые диагностические стерильные. 14.2.11. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные нитриловые неопудренные текстурированные. Размеры XS, S, M, L, XL. Голубого цвета, производства "Топ Глоув Сдн. Бхд.", Малазия, РУ № РЗН 2017/5679. 14.2.12. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, производства "Жонхон Пулин Медикал Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2021/14392, варианты исполнения: 14.2.12.1. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: S. 14.2.12.2. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: M. 14.2.12.3. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: L. 14.2.13. Перчатки хирургические и смотровые, производства «Веар Сейф Малайзия Сдн. Вхд.», Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185, вариант исполнения: 14.2.13.1. Перчатки латексные смотровые, размеры: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9.
15	15. Пинцет полимерный - не более 2шт., варианты исполнения: 15.1. Пинцеты полимерные одноразовые стерильные, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ № ФСР 2010/07936. 15.2. Пинцеты медицинские SUYUN. Размеры: 125мм, 150мм, 200мм, , производства «Цзяньсу СУЮН Медикал Материалс Ко.Лтд» Китай, РУ №ФСЗ 2010/06996.
16	16. Повязка для фиксации канюль (Повязка стерильная «matorat» Capula Plast из нетканого материала для фиксации канюль. Размеры: 5,8х8см., 5х7,2см., РУ №ФСЗ 2008/01690 производства АО «ТЗМО С.А.», Польша) - не более 2 шт.
17	17. Повязка - не более 5шт., варианты исполнения: 17.1. Повязка стерильная matorat:Fixopore S из нетканого материала с впитывающей прокладкой, размеры: 5х7,2см, 8х15см, 10х6см, 10х8см, 10х20см, 10х25см, 10х30см, 10смх35см., производства АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ № ФСЗ 2008/01691. 17.2. Пластырь медицинский фиксирующий, производства «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07988, вариант исполнения: 17.2.1 Пластырь медицинский фиксирующий «Круподерм» ®, размеры в см: 6х7, 9х10, 9х15, 10х20, 10х25. 17.3 Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428, вариант исполнения: 17.3.1. Повязки пластырного типа Costopor® E steril / Космопор Е стерил (стерильная): размеры: 7,2х5см, 10х6см, 15х6см, 10х8см, 15х8см, 20х8см, 20х10см, 25х10см, 35х10см, 15х9см.
18	18. Шприц - не более 5 шт., варианты исполнения: 18.1. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005», производства АО «РКИЦ «Прогресс», Россия, РУ № ФСР 1810/08648, варианты исполнения: 18.1.1. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 2А «Луер». 18.1.2. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 5Б «Луер». 18.1.3. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 10Б «Луер». 18.1.4. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 20Б «Луер». 18.2. Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008, производства ООО «Стерин», Россия, РУ № ФСР 2008/03253, варианты исполнения: 18.2.1. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 2А «Луер».

	18.2.2. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 5Б «Луер». 18.2.3. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 10Б «Луер». 18.2.4. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 20Б «Луер». 18.3. Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005, производства АО «Медполимер ЛТД», Россия, РУ № ФСР 2010/07477, в следующих исполнениях: 18.3.1. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 2А «Луер», вместимостью 2 см³. 18.3.2. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5 см³. 18.3.3. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10 см³. 18.3.4. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20см³. 18.3.5. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20см³. 18.3.6. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 2А «Луер», вместимостью 2см³. 18.3.7. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5см³. 18.3.8. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10см³. 18.4. Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглами и без игл типа «Луер» и «Луер-Лок», стерильные, объемом: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл по ТУ 9398-001-28994901-2009, производства ООО «ВЕБ-МЕДИКАЛ», Россия, РУ № ФСР 2009/06214. 18.5. Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017, производства ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", Россия, РУ № ФСР 2010/07710, в следующих исполнениях: 18.5.1. трехдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,6х25. 18.5.2. трехдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38. 18.5.3. трехдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38. 18.5.4. трехдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38. 18.5.5. двухдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,45х10 до 0,7х40. 18.5.6. двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7х25 до 1,1х50. 18.5.7. двухдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7х25 до 1,5х50. 18.6. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные или двухдетальные, стерильные типа "Луер" или "Луер Лок" по ТУ 32.50.13-001-93599774-2017, производства ООО "Группа СТК", Россия, РУ № ФСР 2010/08843, объемами в мл: 2, 5, 10 и 20, в вариантах исполнения: 18.6.1. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный или двухдетальный, стерильный типа "Луер" или "Луер Лок", в вариантах исполнения: - 2А, 5Б, 10Б, 20Б, «Луер». 18.7. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010, производства ООО "МПК" Елец", Россия, РУ № ФСР 2008/03888, варианты исполнения: 18.7.1. шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер». 18.7.2. шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер-Лок». 18.7.3. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2; 5; 10; 20 ml «Луер». 18.8. Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трехкомпонентные иглами и без игл Vogt Medical, производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № РЗН 2016/3938, варианты исполнения: 18.8.1. Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трех- компонентные с защитным чехлом Vogt Medical: Объемами 2,0мл, с иглами и без игл : 0,6х25мм(23G); Объемами 5,0мл, 10мл, 20мл с иглами и без игл: 0,8х40мм(21G). 18.9. Шприцы однократного применения с иглой трехкомпонентные стерильные, производства «МедЭйм ЛЛС», США, РУ № ФСЗ 2011/10987, варианты исполнений: 18.9.1. Шприцы инъекционные объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл. 20.10. Шприцы инъекционные однократного применения с иглами, объемом: 5 мл, 10 мл, 20 мл, производства "Зеджианг Хуафу Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09382. 18.11. Шприцы одноразовые стерильные объемом 2 см³ (мл), 5 см³ (мл), 10 см³ (мл), 20 см³ (мл), с иглами и без, производства "Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2009/03552. 18.12. Шприцы инъекционные одноразовые стерильные с иглами и без игл, объем: 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, производства «Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплианс Ко. Лтд», КНР, РУ № ФСЗ 2008/02301, варианты исполнения: 18.12.1. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,6х30 мм (23G), объем: 2 мл. 18.12.2. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 50 мм (21G), объем: 5 мл. 18.12.3. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 40 мм / 0,8 х 38 мм (21G), объем: 10 мл. 18.12.4. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 40 мм / 0,8 х 38 мм (21G), объем: 20 мл. 18.12.5. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 2 мл. 18.12.6. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 5 мл. 18.12.7. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 10 мл. 18.12.8. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 20 мл. 18.13. Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, с иглами, производства "Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09587. 18.14. Шприцы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 2, 5, 10, 20, куб.см, производства «Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2007/00511. 18.15. Шприцы LEIKO медицинские инъекционные стерильные однократного применения объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, с иглами и без игл, производства "Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/08209.
19	19. Бандаж гемостатический для гемодиализа, размер (мм) 30х45, 25х72, 30х72), производства «Нипро Корпорейшн», Япония, РУ №ФСЗ 2007/00721 не более 2шт.
20	20. Колпачок (заглушка) - не более 6 шт., варианты исполнения: 20.1. Колпачок «Луер» однократного применения, производства Унитарное предприятие "ФреБор", Республика Беларусь, РУ № ФСЗ 2010/06417.

	20.2. Заглушка инфузионная, производства «Диспомед Витт оХГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10499
II. Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер», в составе:	
1	1. Пеленка впитывающая - не более 20 шт., варианты исполнения: 1.1. Пеленка впитывающая, длина х ширина в см: (20,0-190,0) х (20,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия. 1.2. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» по ТУ 9398-002-11046488-2016, производства ООО «Медмил», Россия, РУ № РЗН 2016/4992, варианты исполнения: 1.2.1. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Эконом, следующих типоразмеров 20х30 см, 20х60 см, 40х60 см, 60х60 см, 60х90 см, 60х120 см. 1.2.2. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Оптима, следующих типоразмеров 20х30 см, 20х60 см, 40х60 см, 60х60 см, 60х90 см, 60х120 см, 90х170 см с крыльями, 90х180 см с крыльями. 1.3. Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые "Seni", производства ООО "Белла", Россия, РУ № РЗН 2015/2475, варианты исполнения: 1.3.1. Пеленки Seni Soft: Seni Soft (40см х 60см, 60см х 60см, 90см х 60см, 90см х 170см с крыльями из нетканого материала). 1.3.2. Пеленки Seni Soft: Normal (60см х 60см, 90см х 60см). 1.3.3. Пеленки Seni Soft: Seni Soft Basic (40см х 60см, 60см х 60см, 90см х 60 см).
2	2. Пеленка медицинская , длина х ширина в см:(20,0-190,0)х(20,0-190,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 20шт.
3	3. Пеленка с адгезивным слоем , длина х ширина в см:(20,0-190,0)х(20,0-190,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 10шт.
4	4. Лейкопластырь фиксирующий нестерильный - не более 20 шт., варианты исполнения: 4.1. Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, производства ООО "НПМ", Россия, РУ № ФСР 2007/00789, следующих исполнений: I Основа (подложка): нетканая. II. Размерный ряд, см: 4.1.1. нетканая основа (лейкопластырь в виде рулона намотанного без гильзы (катушки) или на картонную гильзу или пластмассовую катушку): - длина 1000,0 х ширина от 1,0 до 5,0 шаг 0,5; - длина 1000,0 х ширина свыше 5,0 до 30,0 шаг 1,0. 4.2. Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/01442, варианты исполнения: 4.2.1. на нетканой основе, пластырь-повязка NW рулонный, с впитывающей прокладкой и без нее, гипоаллергенный, размеры, см: 5х1000; 10х1000. 4.3. Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства «Фармлайн ООО», Чешская Республика, РУ№ РЗН 2022/18988, в вариантах исполнения: На нетканой основе: 4.3.1. TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5х1000; 10х1000. 4.4. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производства "ФармЛайн Лимитед", Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959, Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе; 4.5. Пластырь-повязка рулонный, фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт), производства ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, РУ № РЗН 2017/5942, варианты исполнения: 4.5.1. На нетканой основе: 5,0 см х 10, 0 м; 10,0 см х 10,0 м. 4.6. Пластырь медицинский фиксирующий, производства "ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, РУ№ ФСЗ 2010/07988, варианты исполнения: 4.6.1. Пластырь медицинский фиксирующий Крупификс, размеры в см: - 5×1000, 10×1000. 4.7. Пластыри и повязки фиксирующие по ТУ 9393-004-61014306-2015, производства АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", Россия, РУ №РЗН 2016/3848, варианты исполнения: 4.7.1. повязка фиксирующая, гипоаллергенная, пластырного типа КРУПОФИКС следующих типоразмеров (см): 5х1000; 10х1000. 4.8. Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, производства "Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428, варианты исполнения: 4.8.1. Пластырь нетканый фиксирующий Omnifix® elastic/ Омнификс эластик (нестерильный), размеры: 10 м х 2,5 см, 10 м х 5 см, 10 м х 10 см.. 4.9. Пластырь фиксирующий на катушках и в рулонах, нестерильный, производства "Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № РЗН 2023/21505, варианты исполнения: 4.9.1. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 5 см х 10 м - 1 шт. 4.9.2. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 10 см х 10 м - 1 шт. 4.9.3. Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 2,5 см х 10 м - 2 шт.
5	5. Полотенце , длина х ширина в см: (10,0-110,0)х(10,0-110,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 10шт.
6	6. Простыня с отверстием с адгезивным слоем , длина х ширина в см: (20,0-260,0)х(20,0-260,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 10шт.
7	7. Салфетка впитывающая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия- не более 50шт.
8	8. Салфетка марлевая (длина х ширина в см: (3,0-42,0)х(3,0-42,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50шт.
9	9. Салфетка медицинская (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия) - не более 20шт.
10	10. Салфетка с разрезом (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2 шт.

11	11. Тампон впитывающий , прямоугольной, треугольной или круглой формы, длина x ширина в см: (2,4-9,5)x (2,4-9,5) или диаметром, см. (2,4-9,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50шт.
12	12. Тампон марлевый , прямоугольной, треугольной или круглой формы, длина x ширина в см: (2,4-9,5)x (2,4-9,5) или диаметром, см. (2,4-9,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия, не более 50шт.
13	13. Бинт самофиксирующийся - не более 3шт., варианты исполнения: 13.1. Бинты эластичные фиксирующие самоприлипающие Matofix COHESIVE под товарным знаком matofix, размеры 15см x 4м, 12см x 4м, 10см x 4м, 8см x 4м, 6см x 4м, 15см x 4,5м, 12см x 4,5м, 10см x 4,5м, 8см x 4,5м, 6см x 4,5м, 15см x 5м, 12см x 5м, 10см x 5м, 8см x 5м, 6см x 5м.. производства АО «Торуньске заклады матернатув опатрунковых С.А.», Польша, РУ № ФСЗ 2012/11570. 13.2. Изделия медицинские эластичные компрессионные и фиксирующие: фиксирующие бинты эластичные, самофиксирующиеся: -Peha-haft (Пеха-хафт), размеры 4 м x 4 см, 4 м x 6 см, 4мx8см, 4мx10см, 4мx12см, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/09638. 13.3. Бинт марлевый самофиксирующийся нестерильный «Кобинт» по ТУ 9393-007-74639918-2006, размеры: 4 м x 6 см, 4мx8см, 4мx10см, 4мx12см, производства ООО «Новые Перевязочные Материалы», Россия, РУ № -ФСР 2007/00790. 13.4. Бинты эластичные фиксирующие медицинские по ТУ 21.20.24-001-83998195-2017, производства ООО "СМ-РосТ", Россия, РУ № РЗН 2017/6538, варианты исполнения: 13.4.1 - БЭФМ 60 мм x 4000 мм; - БЭФМ 80 мм x 4000 мм; - БЭФМ 100 мм x 4000 мм; - БЭФМ 120 мм x 4000 мм; - БЭФМ 150 мм x 4000 мм. 13.5. Бинт когезивный самофиксирующийся по ТУ 32.50.22-003-32459763-2022, производства ООО "ХЕЛСЛАБ", Россия, РУ № РЗН 2023/21104, в вариантах исполнения: 13.5.1. TENERIS Бинт когезивный самофиксирующийся на тканевой основе (без латекса). Размер (длина в растянутом состоянии): 4 см x 4 м; 6 см x 4 м; 8 см x 4 м; 10 см x 4,5 м. 13.6. Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся) по ТУ 9393-003-10715071-2017, производства ООО "ХБК "Навтекс", Россия, РУ № РЗН 2018/7444, варианты исполнения: 13.6.1. Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся) белые по ТУ 9393-003-10715071-2017, размером 4,0 м x 4,0 см; 4,0 м x 6,0 см; 4,0 м x 8,0 см; 4,0 м x 10,0 см; 4,0 м x 12,0 см; 5,0 м x 6,0 см; 5,0 м x 8,0 см; 5,0 м x 10,0 см; 5,0 м x 12,0 см
14	14. Лотки полимерные почкообразные ЛП-«КМИЗ» (160мм и 260мм) производства ООО «Полимерные изделия» Россия, РУ № ФСР 2011/10604 не более 2 шт.
15	15. Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках - не более 7 шт., варианты исполнения: 15.1. Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные «ГЕКСА» по ТУ 9398-017-18603495-2010, производства ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия, РУ № ФСР 2010/09436, варианты исполнения: 15.1.3. Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на резинке, голубая). 15.1.4. Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на завязках, голубая). 15.2. Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08512. 15.3. Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-75756402-2020, производства ООО «МЕДИКА Е», Россия, РУ № РЗН 2020/10301. 15.4. Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010, производства ООО «КИТ», Россия, РУ № ФСР 2010/09673, варианты исполнения: 15.3.1. маска медицинская стандарт. 15.3.2. маска медицинская классик.
16	16. Перчатки - не более 7 пар, варианты исполнения: 16.1. Перчатки хирургические: 16.1.1. Перчатки латексные стерильные по ТУ 2514-001-50341858-2007, производства ООО «Жасмин Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00456, следующих исполнений: 16.1.1.1. Перчатки латексные хирургическими стерильные: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. 16.1.2. Перчатки хирургические и смотровые, производства "Вепр Сейф (Малайзия) Сдн. Вхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185, вариант исполнения: 16.1.2.1. Перчатки латексные хирургические стерильные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. 16.1.3. Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № ФСР 2011/12244, следующих типоразмеров: 16.1.3.1. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. 16.1.4. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Вепру" стерильные и нестерильные, производства "ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/12488, вариант исполнения: 16.1.4.1. Перчатки хирургические латексные анатомические неопудренные стерильные, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. 16.1.5. Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства "Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220, вариант исполнения: 16.1.5.1. Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. 16.1.6. Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368, вариант исполнения: 16.1.6.1. перчатки латексные хирургические стерильные. 16.1.6.2. перчатки латексные хирургические нестерильные. 16.1.7. Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, РУ №ФСР 2008/03089, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные стерильные, неопудренные. 16.2. Перчатки смотровые: 16.2.1. Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011, производства ООО «Русская Медицинская Упаковка», Россия, РУ № ФСР 2011/12244, следующих типоразмеров

	16.2.1.1. Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 16.2.1.2. Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL. 16.2.2. Перчатки латексные стерильные по ТУ 2514-001-50341858-2007, производства ООО «Жасмин Мед», Россия, РУ № ФСР 2007/00456, следующих исполнений: 16.2.2.1 Перчатки латексные смотровые стерильные: S(6-7), M(7-8), L(8-9). 16.2.3. Перчатки медицинские смотровые "Супермакс", латексные и нитриловые, производства "Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/02932, варианты исполнения: 16.2.3.1. Перчатки медицинские смотровые, латексные. 16.2.3.2. Перчатки медицинские смотровые, нитриловые. 16.2.4. Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой) размеры: XS, S, M, L, производства "Сара Гигиена Малайзия Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/11582. 16.2.5. Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, производства "Райзен (Тяньцзинь) Хэлфза Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220, варианты исполнения: 16.2.5.1. Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - синий, белый, фиолетовый, размеры XS, S, M, L. 16.2.5.2. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. 16.2.6. Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства BPI Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6102, варианты исполнения: 16.2.6.1. Маленькие (S) 0-100 шт. 16.2.6.2. Средние (M) 0-100 шт. 16.2.6.3. Большие (L) 0-100 шт. 16.2.7. Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства "BPI Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6105, варианты исполнения: 16.2.7.1 Маленькие (S) 0-100 шт. 16.2.7.2 Средние (M) 0-100 шт. 16.2.7.3 Большие (L) 0-100 шт. 16.2.8. Перчатки медицинские, производства «Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-X)», Малайзия, РУ № ФСЗ 2011/10210, вариант исполнения: 16.2.8.1. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovu», цвет: бирюзовый, синий, белый, голубой, зеленый, сиреневый, размеры: XS, S, M, L 16.2.8.2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovu», цвет: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L 16.2.9. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Benovu" стерильные и нестерильные, производства "ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/12488, варианты исполнения: 16.2.9.1. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L. 16.2.9.2. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые, цвета: бирюзовый, синий, белый, голубой, сиреневый, зеленый, размеры: XS, S, M, L. 16.2.10. Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368, варианты исполнения: 16.2.10.1. перчатки латексные смотровые диагностические стерильные. 16.2.10.2. перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные. 16.2.10.3. перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные. 16.2.10.4. перчатки синтетические смотровые диагностические стерильные. 16.2.11. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные нитриловые неопудренные текстурированные. Размеры XS, S, M, L, XL. Голубого цвета, производства "Топ Глоув Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № РЗН 2017/5679. 16.2.12. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, производства "Жонхон Пулин Медикал Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2021/14392, варианты исполнения: 16.2.12.1. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: S. 16.2.12.2. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: M. 16.2.12.3. Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: L. 16.2.13. Перчатки хирургические и смотровые, производства «Веар Сейф Малайзия Сдн. Вхд.», Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185, вариант исполнения: 16.2.13.1. Перчатки латексные смотровые, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.
17	17. Повязка - не более 5шт., варианты исполнения 17.1. Повязка стерильная таторат:Fixoroge S из нетканого материала с впитывающей прокладкой, производства АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ № ФСЗ 2008/01691, размеры: 5x7,2см, 8x15см, 10x6см, 10x8см, 10x20см, 10x25см, 10x30см, 10смx35см. 17.2. Пластырь медицинский фиксирующий, производства «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07988, вариант исполнения: 17.2.1 Пластырь медицинский фиксирующий «Круподерм» ®, размеры в см: 6x7, 9x10, 9x15, 10x20, 10x25. 17.3 Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428, вариант исполнения: 17.3.1. Повязки пластырного типа Cosmopor® E steril / Космопор Е стерил (стерильная): размеры: 7,2x5см, 10x6см, 15x6см, 10x8см, 15x8см, 20x8см, 20x10см, 25x10см, 35x10см, 15x9см.
18	18. Шприц - не более 5 шт., варианты исполнения: 18.1. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по

ТУ 9398-093-43892776-2005», производства АО «РКЦ «Прогресс», Россия, РУ № ФСП 2010/08648, варианты исполнения:

- 18.1.1. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 2А «Луер».
- 18.1.2. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 5Б «Луер».
- 18.1.3. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 10Б «Луер».
- 18.1.4. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 20Б «Луер».
- 18.2. Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008, производства ООО «Стерин», Россия, РУ № ФСП 2008/03253, варианты исполнения:
- 18.2.1. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 2А «Луер».
- 18.2.2. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 5Б «Луер».
- 18.2.3. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 10Б «Луер».
- 18.2.4. Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 20Б «Луер».
- 18.3. Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005, производства АО «Медполимер ЛТД», Россия, РУ № ФСП 2010/07477, в следующих исполнениях:
- 18.3.1. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 2А «Луер», вместимостью 2 см³.
- 18.3.2. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5 см³.
- 18.3.3. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10 см³.
- 18.3.4. шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20 см³.
- 18.3.5. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20 см³.
- 18.3.6. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 2А «Луер», вместимостью 2 см³.
- 18.3.7. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5 см³.
- 18.3.8. шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10 см³.
- 18.4. Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглами и без игл типа «Луер» и «Луер-Лок», стерильные, объемом: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл по ТУ 9398-001-28994901-2009, производства ООО «БЕБ-МЕДИКАЛ», Россия, РУ № ФСП 2009/06214.
- 18.5. Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017, производства ООО «МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН», Россия, РУ № ФСП 2010/07710, в следующих исполнениях:
- 18.5.1. трехдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,6х25.
- 18.5.2. трехдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38.
- 18.5.3. трехдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38.
- 18.5.4. трехдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38.
- 18.5.5. двухдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,45х10 до 0,7х40.
- 18.5.6. двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7х25 до 1,1х50.
- 18.5.7. двухдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7х25 до 1,5х50.
- 18.6. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные или двухдетальные, стерильные типа "Луер" или "Луер Лок" по ТУ 32.50.13-001-93599774-2017, производства ООО "Группа СТК", Россия, РУ № ФСП 2010/08843, объемами в мл: 2, 5, 10 и 20, в вариантах исполнения:
- 18.6.1. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный или двухдетальный, стерильный типа "Луер" или "Луер Лок", в вариантах исполнения: - 2А, 5Б, 10Б, 20Б, «Луер».
- 18.7. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010, производства ООО "МПК" Елец", Россия, РУ № ФСП 2008/03888, варианты исполнения:
- 18.7.1. шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер».
- 18.7.2. шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер-Лок».
- 18.7.3. шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2; 5; 10; 20 ml «Луер».
- 18.8. Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трехкомпонентные иглами и без игл Vogt Medical, производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № РЗН 2016/3938, варианты исполнения:
- 18.8.1. Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трех- компонентные с защитным чехлом Vogt Medical: Объемами 2,0мл, с иглами и без игл : 0,6х25мм(23G); Объемами 5,0мл, 10мл, 20мл с иглами и без игл: 0,8х40мм(21G).
- 18.9. Шприцы однократного применения с иглой трехкомпонентные стерильные, производства «МедЭйм ЛЛС», США, РУ № ФСЗ 2011/10987, варианты исполнений:
- 18.9.1. Шприцы инъекционные объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл.
- 18.10. Шприцы инъекционные однократного применения с иглами, объемом: 5 мл, 10 мл, 20 мл, производства "Зеджианг Хуафу Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09382.
- 18.11. Шприцы одноразовые стерильные объемом 2 см³ (мл), 5 см³ (мл), 10 см³ (мл), 20 см³ (мл), с иглами и без, производства "Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2009/03552.
- 18.12. Шприцы инъекционные одноразовые стерильные с иглами и без игл, объем: 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, производства «Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Энплиансе Ко. Лтд», КНР, РУ № ФСЗ 2008/02301, варианты исполнения:
- 18.12.1. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,6х30 мм (23G), объем: 2 мл.
- 18.12.2. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 50 мм (21G), объем: 5 мл.
- 18.12.3. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 40 мм / 0,8 х 38 мм (21G), объем: 10 мл.
- 18.12.4. шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 х 40 мм / 0,8 х 38 мм (21G), объем: 20 мл.
- 18.12.5. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 2 мл.
- 18.12.6. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 5 мл.
- 18.12.7. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 10 мл.
- 18.12.8. шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 20 мл.
- 18.13. Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, с иглами, производства "Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09587.
- 18.14. Шприцы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 2, 5, 10, 20, куб.см, производства «Джингкси Хонгда

	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09587. 18.14. Шприц ы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 2, 5, 10, 20, куб.см, производства «Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд». Китай, РУ № ФСЗ 2007/00511. 18.15. Шприцы LEIKO медицинские инъекционные стерильные однократного применения объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, с иглами и без игл, производства "Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/08209.
19	19. Колпачок (заглушка) - не более 6 шт.. варианты исполнения: 19.1. Колпачок «Луер» однократного применения, производства Унитарное предприятие "ФреБор". Республика Беларусь, РУ № ФСЗ 2010/06417. 19.2. Заглушка инфузионная, производства «Диспомед Витт оХГ», Германия, РУ № ФСЗ 2011/10499.

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

17.1 Изделия выпускаются стерильными. Стерилизация осуществляется газовым способом (оксидом этилена) по ГОСТ ISO 11135-2017.

17.2. В состав комплекта входят изделия контурной и прямоугольной формы, изготовлены из нетканых полотен типа Спан-мелт-спан (СМС), Спанлейс, Марли медицинской вязкой и Марли медицинской хлопчатобумажной.

17.3. Общий вид изделий (рисунки 1 – 18).

Рисунок 1. Пеленка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.003.01».
Пеленка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.003.02».

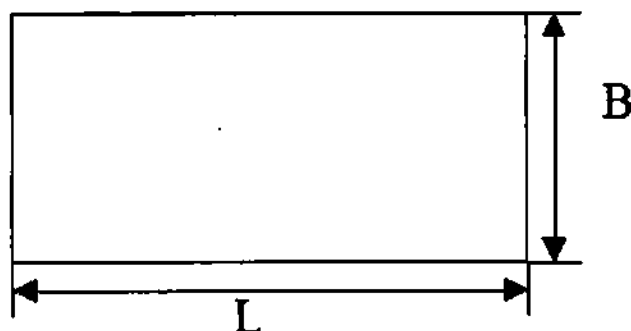


Рисунок 2. Пеленка с адгезивным слоем.
Обозначение «Барьер 9398.003.03».

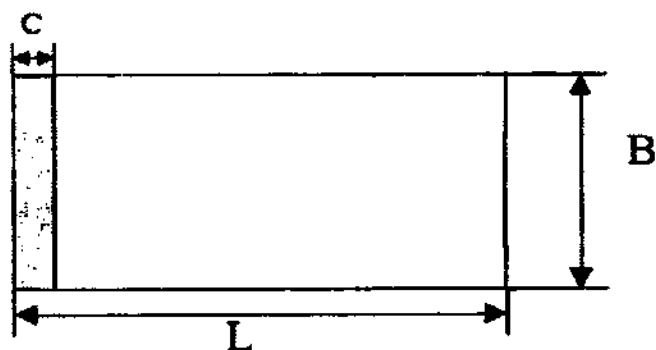


Рисунок 3. Полотенце. Обозначение «Барьер 9398.003.04».

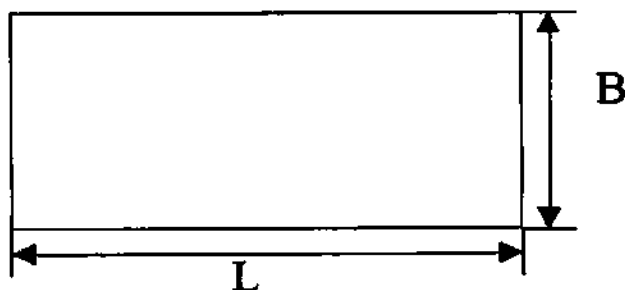


Рисунок 4. Простыня с отверстием с адгезивным слоем.
Обозначение «Барьер 9398.003.05»

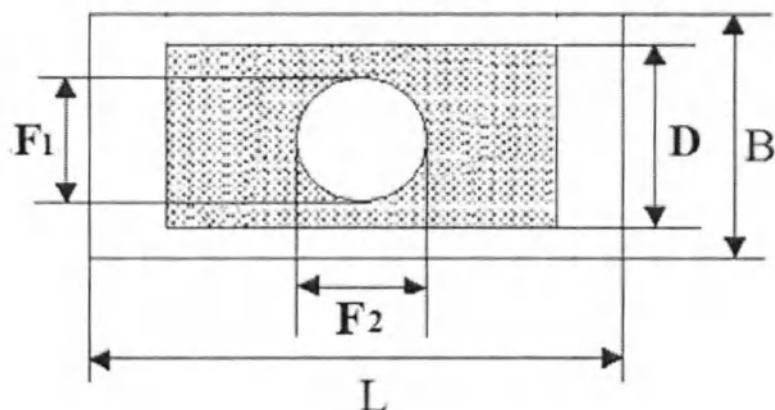


Рисунок 5. Салфетка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.003.06».
Салфетка марлевая. Обозначение «Барьер 9398.003.07»
Салфетка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.003.08».

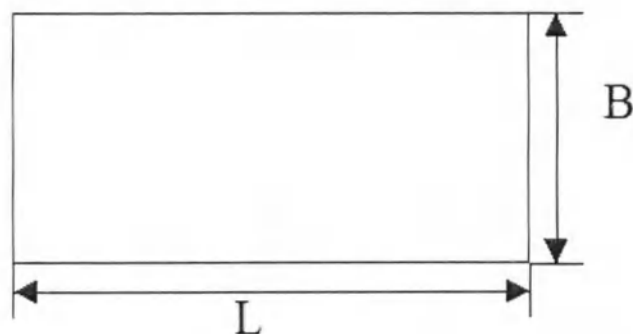


Рисунок 6. Салфетка с разрезом. Обозначение «Барьер 9398.003.09».

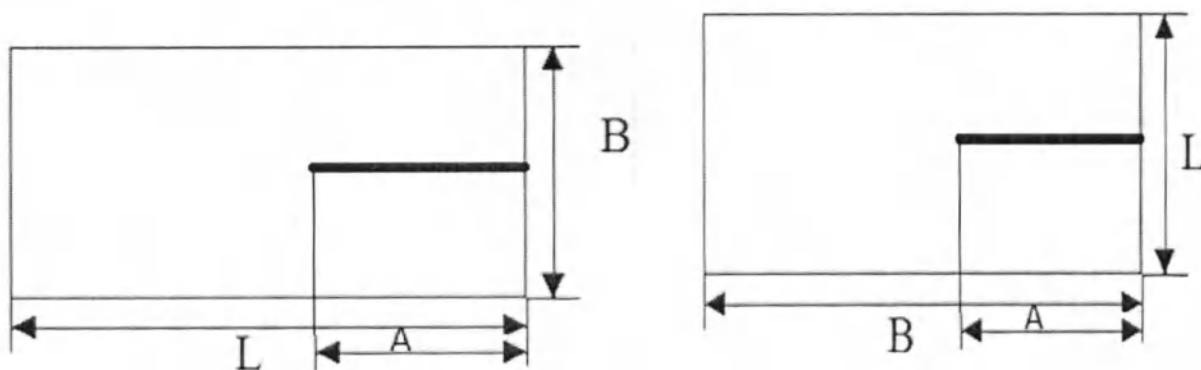


Рисунок 7. Тампон впитывающий. Обозначение «Барьер 9398.003.10».
Тампон марлевый. Обозначение «Барьер 9398.003.11».

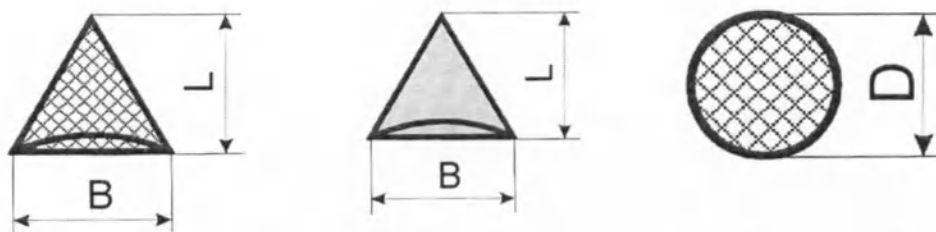


Рисунок 8. Бинт марлевый медицинский
Бинт самофиксирующийся

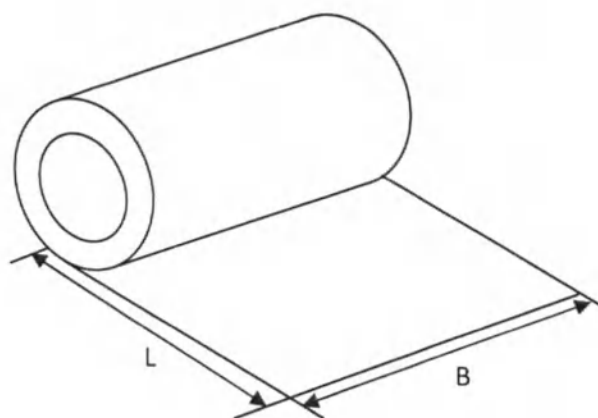


Рисунок 9. Лоток полимерный

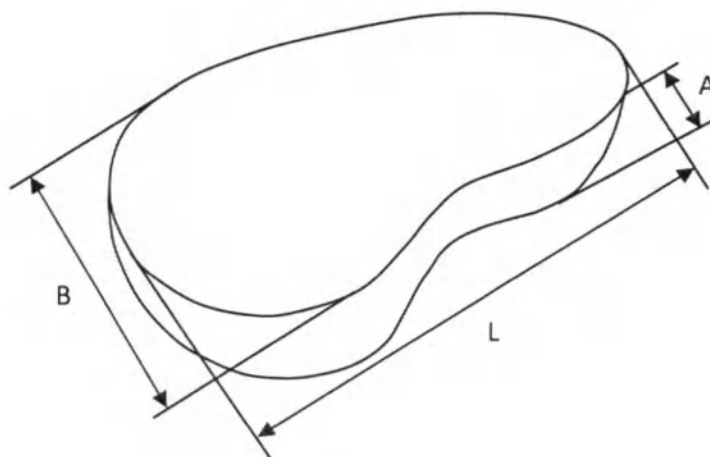


Рисунок 10. Маска медицинская.

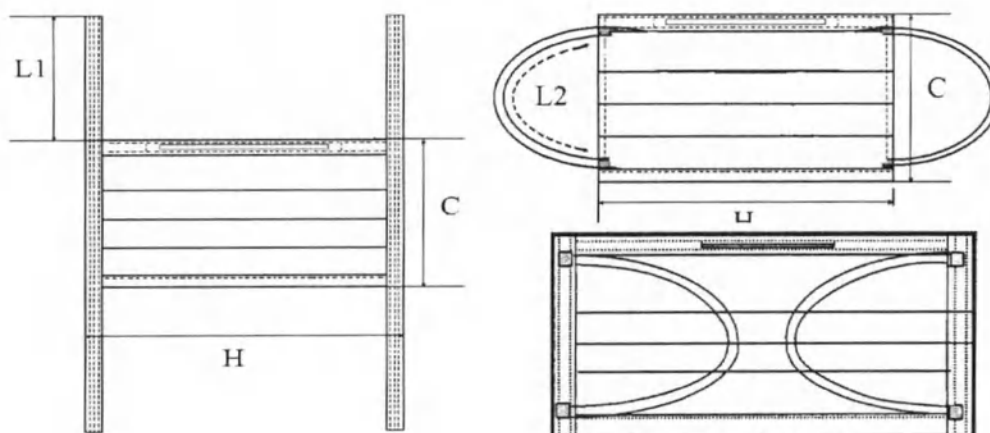


Рисунок 11. Перчатки хирургические
Перчатки смотровые

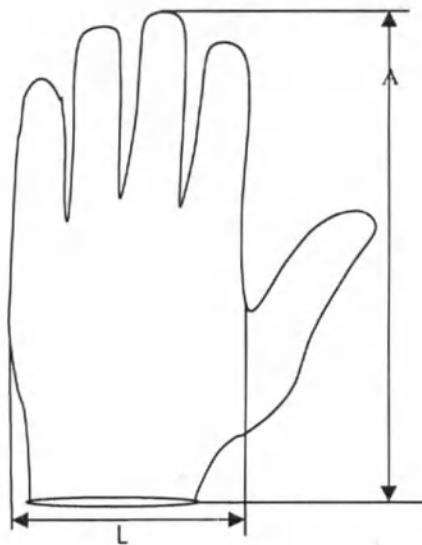


Рисунок 12. Пинцет полимерный

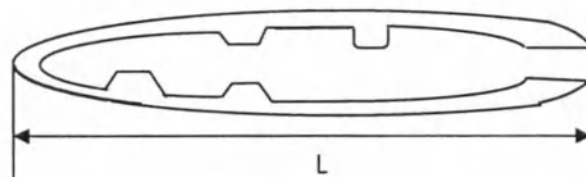


Рисунок 13. Повязка для фиксации канюль
Повязка.

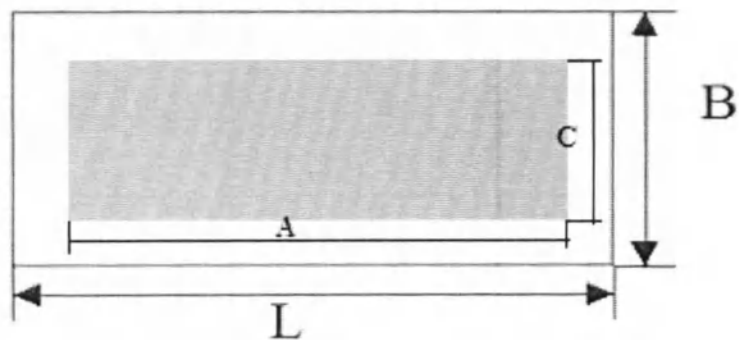


Рисунок 14. Шприц



Рисунок 15. Фиксирующий лейкопластырь

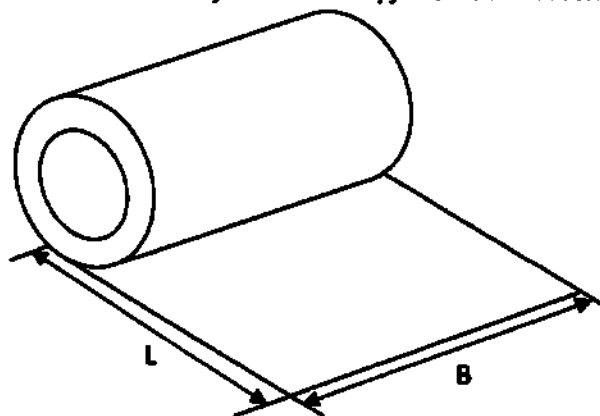


Рисунок 16. Бандаж гемостатический


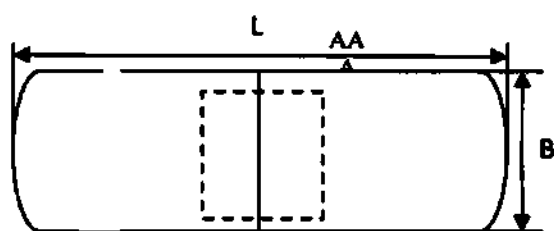


Рисунок 17. Колпачок (заглушка)



Рисунок 18. Пеленка впитывающая «Медмил», «Seni»

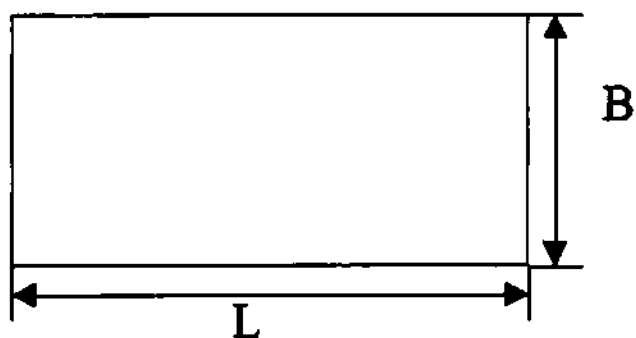

17.4. Основные линейные размеры изделий должны соответствовать обозначению «Барьер 9398.003.XX» и требованиям, представленным в таблицах 1 – 26.

Таблица 1 (к рисунку 1)

Пеленка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.003.01».	
Длина пеленки (L), см	Ширина пеленки (B), см
22,0±2,0	22,0±2,0
26,0±2,0	26,0±2,0
30,0±3,0	30,0±3,0
36,0±3,0	36,0±3,0
42,0±4,0	42,0±4,0
50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
120,0±10,0	120,0±10,0
140,0±10,0	140,0±10,0
160,0±10,0	160,0±10,0
180,0±10,0	180,0±10,0

Таблица 2 (к рисунку 1)

Пеленка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.003.02».	
Длина пеленки (L), см	Ширина пеленки (B), см
22,0±2,0	22,0±2,0
26,0±2,0	26,0±2,0
30,0±3,0	30,0±3,0
36,0±3,0	36,0±3,0
42,0±4,0	42,0±4,0
50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
120,0±10,0	120,0±10,0
140,0±10,0	140,0±10,0
160,0±10,0	160,0±10,0
180,0±10,0	180,0±10,0

Таблица 3 (к рисунку 2)

Пеленка с адгезивным слоем. Обозначение «Барьер 9398.003.03».		
Длина пеленки (L), см	Ширина пеленки (B), см	Ширина адгезивного слоя (C), см
22,0±2,0	22,0±2,0	3,0±0,3
26,0±2,0	26,0±2,0	4,0±0,3
30,0±3,0	30,0±3,0	5,0±0,5
36,0±3,0	36,0±3,0	6,0±0,5
42,0±4,0	42,0±4,0	
50,0±5,0	50,0±5,0	
60,0±5,0	60,0±5,0	
70,0±5,0	70,0±5,0	
80,0±5,0	80,0±5,0	
90,0±5,0	90,0±5,0	
100,0±10,0	100,0±10,0	
120,0±10,0	120,0±10,0	
140,0±10,0	140,0±10,0	
160,0±10,0	160,0±10,0	
180,0±10,0	180,0±10,0	

Таблица 4 (к рисунку 3)

Полотенце. Обозначение «Барьер 9398.003.04».	
Длина полотенца (L), см	Ширина полотенца (B), см
11,0±1,0	11,0±1,0
14,0±2,0	14,0±2,0
18,0±2,0	18,0±2,0
22,0±2,0	22,0±2,0
26,0±2,0	26,0±2,0
30,0±3,0	30,0±3,0
36,0±3,0	36,0±3,0
42,0±4,0	42,0±4,0
50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0

Таблица 5 (к рисунку 4)

Простыня с отверстием с адгезивным слоем. Обозначение «Барьер 9398.003.05».				
Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Длина отверстия (или диаметр) (F2), см	Ширина отверстия (или диаметр) (F1), см	Ширина адгезивного слоя, см
22,0±2,0	22,0±2,0	3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3	3,0±0,3
26,0±2,0	26,0±2,0	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	4,0±0,3
30,0±3,0	30,0±3,0	7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5	5,0±0,5
36,0±3,0	36,0±3,0	8,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	6,0±0,5
42,0±4,0	42,0±4,0	9,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5	
50,0±5,0	50,0±5,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	
60,0±5,0	60,0±5,0	12,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	
70,0±5,0	70,0±5,0	14,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	
80,0±5,0	80,0±5,0	16,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0	
90,0±5,0	90,0±5,0	18,0 ± 1,0	18,0 ± 1,0	
100,0±10,0	100,0±10,0			
110,0±10,0	110,0±10,0			
130,0±10,0	130,0±10,0			
150,0±10,0	150,0±10,0			
170,0±10,0	170,0±10,0			
190,0±10,0	190,0±10,0			
210,0±10,0	210,0±10,0			
230,0±10,0	230,0±10,0			
250,0±10,0	250,0±10,0			

Таблица 6 (к рисунку 5)

Салфетка впитывающая. Обозначение «Барьер 9398.003.06».	
Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (B), см
3,3±0,3	3,3±0,3
3,9±0,3	3,9±0,3
4,6±0,4	4,6±0,4
5,0±0,5	5,0±0,5
6,0±0,5	6,0±0,5
7,0±0,5	7,0±0,5
8,0±0,5	8,0±0,5
9,0±0,5	9,0±0,5
10,0±1,0	10,0±1,0
12,0±1,0	12,0±1,0
14,0±1,0	14,0±1,0
16,0±1,0	16,0±1,0
18,0±1,0	18,0±1,0

20,0±2,0	20,0±2,0
24,0±2,0	24,0±2,0
28,0±2,0	28,0±2,0
33,0±3,0	33,0±3,0
39,0±3,0	39,0±3,0
46,0±4,0	46,0±4,0
55,0±5,0	55,0±5,0
65,0±5,0	65,0±5,0
75,0±5,0	75,0±5,0
85,0±5,0	85,0±5,0

Таблица 7 (к рисунку 5)

Салфетка марлевая. Обозначение «Барьер 9398.003.07».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (B), см
3,3±0,3	3,3±0,3
3,9±0,3	3,9±0,3
4,6±0,4	4,6±0,4
5,0±0,5	5,0±0,5
6,0±0,5	6,0±0,5
7,0±0,5	7,0±0,5
8,0±0,5	8,0±0,5
9,0±0,5	9,0±0,5
10,0±1,0	10,0±1,0
12,0±1,0	12,0±1,0
14,0±1,0	14,0±1,0
16,0±1,0	16,0±1,0
18,0±1,0	18,0±1,0
20,0±2,0	20,0±2,0
24,0±2,0	24,0±2,0
28,0±2,0	28,0±2,0
33,0±3,0	33,0±3,0
39,0±3,0	39,0±3,0

Таблица 8 (к рисунку 5)

Салфетка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.003.08».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (B), см
3,3±0,3	3,3±0,3
3,9±0,3	3,9±0,3
4,6±0,4	4,6±0,4
5,0±0,5	5,0±0,5
6,0±0,5	6,0±0,5
7,0±0,5	7,0±0,5
8,0±0,5	8,0±0,5
9,0±0,5	9,0±0,5
10,0±1,0	10,0±1,0
12,0±1,0	12,0±1,0
14,0±1,0	14,0±1,0
16,0±1,0	16,0±1,0
18,0±1,0	18,0±1,0
20,0±2,0	20,0±2,0
24,0±2,0	24,0±2,0
28,0±2,0	28,0±2,0
33,0±3,0	33,0±3,0
39,0±3,0	39,0±3,0
46,0±4,0	46,0±4,0
55,0±5,0	55,0±5,0
65,0±5,0	65,0±5,0
75,0±5,0	75,0±5,0
85,0±5,0	85,0±5,0

Таблица 9 (к рисунку 6)

Салфетка с разрезом. Обозначение «Барьер 9398.003.09».

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (H), см	Длина разреза (A), см
3,3±0,3	3,3±0,3	3,0 ± 0,5
3,9±0,3	3,9±0,3	4,0 ± 0,5
4,6±0,4	4,6±0,4	5,0 ± 0,5
5,0±0,5	5,0±0,5	6,0 ± 0,5
6,0±0,5	6,0±0,5	7,0 ± 0,5
7,0±0,5	7,0±0,5	8,0 ± 0,5
8,0±0,5	8,0±0,5	9,0 ± 0,5
9,0±0,5	9,0±0,5	10,0 ± 1,0
10,0±1,0	10,0±1,0	12,0 ± 1,0
12,0±1,0	12,0±1,0	14,0 ± 1,0
14,0±1,0	14,0±1,0	16,0 ± 1,0
16,0±1,0	16,0±1,0	18,0 ± 1,0
18,0±1,0	18,0±1,0	19,0 ± 1,0
20,0±2,0	20,0±2,0	
24,0±2,0	24,0±2,0	
28,0±2,0	28,0±2,0	
33,0±3,0	33,0±3,0	
39,0±3,0	39,0±3,0	
46,0±4,0	46,0±4,0	
55,0±5,0	55,0±5,0	
65,0±5,0	65,0±5,0	
75,0±5,0	75,0±5,0	
85,0±5,0	85,0±5,0	

Таблица 10 (к рисунку 7)

Тампон впитывающий. Обозначение «Барьер 9398.003.10».

Длина изделия (L), см	Ширина изделия (B), см	Диаметр изделия (D), см
2,7±0,3	2,7±0,3	-
3,3±0,3	3,3±0,3	-
3,9±0,3	3,9±0,3	-
4,6±0,4	4,6±0,4	-
5,0±0,5	5,0±0,5	-
6,0±0,5	6,0±0,5	-
7,0±0,5	7,0±0,5	-
8,0±0,5	8,0±0,5	-
9,0±0,5	9,0±0,5	-
-	-	2,7±0,3
-	-	3,3±0,3
-	-	3,9±0,3
-	-	4,6±0,4
-	-	5,0±0,5
-	-	6,0±0,5
-	-	7,0±0,5
-	-	8,0±0,5
-	-	9,0±0,5

Таблица 11 (к рисунку 7)

Тампон марлевый. Обозначение «Барьер 9398.003.11».

Длина изделия (L), см	Ширина изделия (B), см	Диаметр изделия (D), см
2,7±0,3	32,7±0,3	-
3,3±0,3	3,3±0,3	-
3,9±0,3	3,9±0,3	-
4,6±0,4	4,6±0,4	-
5,0±0,5	5,0±0,5	-
6,0±0,5	6,0±0,5	-
7,0±0,5	7,0±0,5	-
8,0±0,5	8,0±0,5	-
9,0±0,5	9,0±0,5	-
-	-	2,7±0,3
-	-	3,3±0,3
-	-	3,9±0,3
-	-	4,6±0,4
-	-	5,0±0,5
-	-	6,0±0,5
-	-	7,0±0,5
-	-	8,0±0,5
-	-	9,0±0,5

Таблица 13 (к рисунку 8).

Бинт марлевый медицинский			
Наименование показателя	Размер 1	Размер 2	Размер 3
Длина бинта (L), м	5,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5
Ширина бинта (B), см	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0

Таблица 14 (к рисунку 8).

Бинт самофиксирующийся	
Длина бинта (L), м	Ширина бинта (B), см
4,0±0,2	4,0±0,2
4,0±0,2	6,0±0,2
4,0±0,2	8,0±0,2
4,0±0,2	10,0±0,5
4,0±0,2	12,0±0,5
4,0±0,2	15,0±0,5
4,5±0,2	6,0±0,5
4,5±0,2	8,0±0,5
4,5±0,2	10,0±0,5
4,5±0,2	12,0±0,5
4,5±0,2	15,0±0,5
5,0±0,2	6,0±0,5
5,0±0,2	8,0±0,5
5,0±0,2	10,0±0,5
5,0±0,2	12,0±0,5
5,0±0,2	15,0±0,5

Таблица 15 (к рисунку 9).

Лоток полимерный		
Наименование показателя	Размер 1	Размер 2
Длина лотка (L), мм	160,0 ± 1,6	260,0 ± 2,1
Ширина лотка (B), мм	85,0 ± 2,2	170,0 ± 2,5
Высота лотка (A), мм	35,0 ± 2,5	45,0 ± 2,5

Таблица 16 (к рисунку 10)

Маска медицинская.	
Длина маски (H), см	17,5 ± 1,5
Ширина маски (C), см	9,5 ± 0,5
Длина завязок (при наличии) (L 1), см	42,0 ± 4,0
Длина резинок в растянутом состоянии (L 2), см (при наличии)	не менее 30,0

Таблица 17 (к рисунку 11).

Перчатки хирургические								
Размеры перчаток	5,5	6	6,5	7 (S)	7,5	8 (M)	8,5	9 (L)
Ширина (L), мм	72,0±4,0	77,0±5,0	83,0±5,0	89,0±5,0	95,0±5,0	102,0±6,0	108,0±6,0	114,0±6,0
Длина (A), мм, не менее	250,0	260,0	260,0	270,0	270,0	270,0	280,0	280,0
Толщина, мм, не менее	0,10							

Таблица 18 (к рисунку 11)

Перчатки смотровые					
Размеры перчаток	XS	S	M	L	XL
Ширина ладони (L), мм	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110
Длина (A), мм, не менее	240,0±5,0	240,0±5,0	240,0±5,0	240,0±5,0	240,0±5,0
Толщина-кончики пальцев, мм	не менее 0,08				
Толщина-ладонь, мм	не более 0,22				

Таблица 19 (к рисунку 12)

Пинцет полимерный				
Наименование показателя	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Длина пинцета (L), мм	125,0 ± 3,0	150,0 ± 15,0	200,0 ± 20,0	250,0 ± 20,0

Таблица 20 (к рисунку 13)

Повязка для фиксации канюль

Наименование показателя	Размер 1	Размер 2
Длина повязки (L), см	8,0 ± 0,5	7,2 ± 0,5
Ширина повязки (B), см	5,8 ± 0,5	5,0 ± 0,5
Длина впитывающей подушечки (A), см	2,4 ± 0,2	2,0 ± 0,2
Ширина впитывающей подушечки (C), см	2,4 ± 0,2	1,5 ± 0,1

Таблица 21 (к рисунку 13)

Повязка.

	Длина повязки (L), см	Ширина повязки (B), см	Длина впитывающей подушечки (A), см	Ширина впитывающей подушечки (C), см
Размер 1	7,2 ± 0,5	5,0 ± 0,5	3,8 ± 0,2	2,8 ± 0,2
Размер 2	7,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	3,8 ± 0,2	2,8 ± 0,2
Размер 3	10,0 ± 0,5	6,0 ± 0,5	5,0 ± 0,2	3,5 ± 0,2
Размер 4	10,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	5,0 ± 0,2	3,8 ± 0,2
Размер 5	10,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5	5,0 ± 0,2	3,8 ± 0,2
Размер 6	15,0 ± 0,5	6,0 ± 0,5	10,0 ± 0,2	3,8 ± 0,2
Размер 7	15,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	10,0 ± 0,2	3,8 ± 0,2
Размер 8	15,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5	10,0 ± 0,2	3,8 ± 0,2
Размер 9	20,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	15,0 ± 0,2	5,0 ± 0,2
Размер 10	20,0 ± 0,5	10,0 ± 0,5	15,0 ± 0,2	5,0 ± 0,2
Размер 11	25,0 ± 0,5	10,0 ± 0,5	20,0 ± 0,2	5,0 ± 0,2
Размер 12	30,0 ± 0,5	10,0 ± 0,5	25,0 ± 0,2	5,0 ± 0,2
Размер 13	35,0 ± 0,5	10,0 ± 0,5	30,0 ± 0,2	5,0 ± 0,2

Таблица 22 (к рисунку 14).

Шприц

Наименование	Размер иглы: внешний диаметр x длина, мм	Номинальная вместимость, мл
Шприц 2А «Луер»	23G 0.6x25 мм 23G 0,6x30 мм 0,45x10мм до 0,7x40мм	2
Шприц 2 ml «Луер-Лок».	0,45x10мм до 0,7x40мм	
Шприц 5Б «Луер»	21G 0.8x38 мм 21G 0,8 x 50 мм	5
Шприц 5 ml «Луер-Лок».	0,7x25мм до 1,1x50мм	
Шприц 10Б «Луер»	21G 0.8x38 мм 21G 0,8 x 40 мм 0,7x25мм до 1,1x50мм	10
Шприц 10 ml «Луер-Лок».	0,7x25мм до 1,1x50мм	
Шприц 20Б «Луер»	21G 0.8x38 мм 21G 0,8 x 40 мм 0,7x25мм до 1,5x50мм	20
Шприц 20 ml «Луер-Лок».	0,7x25мм до 1,5x50мм	

Таблица 23 (к рисунку 15).

Фиксирующий лейкопластырь.

Длина лейкопластыря (L), см *	Ширина лейкопластыря (B), см *
1000,0±10,0	2,5±0,2
1000,0±10,0	5,0±0,5
1000,0±10,0	10,0±1,0
10,0± 1,0	1,6±0,1
12,0± 1,0	1,7±0,1
14,0± 1,0	2,0± 0,2
16,0± 1,0	2,4± 0,2
18,0± 1,0	2,8± 0,2
20,0± 2,0	3,2± 0,2
24,0± 2,0	3,6± 0,2
28,0± 2,0	4,0± 0,4
	4,8± 0,4
	5,5± 0,5
	6,5± 0,5

Таблица 24 (к рисунку 16).

Модель	Бандаж гемостатический.	
	Размер, мм	
	Бандаж (длина (L) x ширина (B))*	Впитывающая губка*
Pushan M	30x45	12x15
Pushan L	25x72	12x15
Pushan Ex.L	30x72	15x20

*Допускаемые отклонения по длине и ширине $\pm 10\%$.

Таблица 25 (к рисунку 17)

Колпачок (заглушка)		
Высота колпачка (заглушки), мм	Внешний диаметр колпачка (заглушки), мм	Внутренний диаметр колпачка (заглушки), мм
не более 20,0	10,0 $\pm$ 1,0	не менее 4,0

Таблица 26 (к рисунку 18)

Пеленка впитывающая «Медмил», «Seni»	
Длина пеленки (L), см*	Ширина пеленки (B), см*
30	20
60	20
60	40
60	60
90	60
120	60
170	90
180	90

*Допускаемые отклонения по длине и ширине $\pm 10\%$.

17.5. Комплекты должны изготавливаться из материалов, представленных в таблице 27.

Таблица 27.

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	2
1. Материал: СМС, марка «Createx-Мед» (полимерное нетканое полотно многослойное типа «спан-мельт-спан» окрашенное, плотность 20 $\pm$ 5 г/м ²)	ООО «Нетканые Материалы», Россия ТУ 2282-001-54788148-16 Краситель: марка 63397-D2-200 (цвет светло-голубой), изготовитель KAFRIT Industries Ltd, Израиль)	Пеленка медицинская Салфетка медицинская Салфетка с разрезом
2. Материал: СМС, марка «Createx-Мед» (полимерное нетканое полотно многослойное типа «спан-мельт-спан» окрашенное, плотность 50 $\pm$ 10 г/м ²)	ООО «Нетканые Материалы», Россия ТУ 2282-001-54788148-16 Краситель: марка 63397-D2-200 (цвет светло-голубой), изготовитель KAFRIT Industries Ltd, Израиль)	Простыня с отверстием с адгезивным слоем Пеленка с адгезивным слоем
3. Материал: СМС, марка «СМС 42» (нетканое полипропиленовое полотно типа «спан-мельт-спан» окрашенное, плотность 50 $\pm$ 10 г/м ²)	ООО «Завод Эластик», Россия ТУ 8390-010-74582615-2009 Краситель: марка 63397-D2-300 (цвет светло-голубой), изготовитель Americhem Europe Limited, Великобритания	Пеленка медицинская Пеленка с адгезивным слоем Простыня с отверстием с адгезивным слоем Салфетка медицинская Салфетка с разрезом
4. Материал: Спанлейс, марка «Спанлейс» (материал нетканый неокрашенный, состав: вискоза 70%, полиэфир 30%, плотность 40 $\pm$ 5 г/м ²)	ООО «Авангард», Россия ТУ 8390-003-56176857-2007	Пеленка впитывающая Полотенце Салфетка впитывающая Салфетка с разрезом Тампон впитывающий
5. Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, арт. 6498-3 (хлопок 100%), плотность 31 $\pm$ 2 г/м ²)	ОАО «Ткацкая фабрика «Медтекс», Россия ТУ 9393-001-00320437-2010 ПУ №ФСР 2010/07903	Салфетка марлевая Тампон марлевый
6. Отрезы марлевые медицинские (хлопок 100%) плотность 32 $\pm$ 2 г/м ²	ООО «ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИН, ВАТНАЯ ФАБРИКА», Россия ТУ 8461-011-44881728-2010 ПУ №ФСР 2010/08978	Салфетка марлевая Тампон марлевый
7. Марля медицинская отбеленная вискозная, МВ-32-90 (вискоза 100%); плотность 32 $\pm$ 2 г/м ²	ООО «БалЭнергоМаш», Россия ТУ 9393-004-55365591-2015 ПУ №РЗН 2016/3814	Салфетка марлевая Тампон марлевый
8. Бинт липкий на полотне нетканом «БИНТЛИ-Т» (Состав: подложка –	ООО «Группа Компания Пальма» Россия	Адгезивный слой для фиксации:

полотно нетканое термоскрепленное Арт.С1.100.03/01/65(Россия), клеевой слой –эмульсия акриловая сополимерная, марка Акронал-212 (Германия), защитное покрытие – бумага антиадгезионная марка «Itasa» 070/CP (Испания)).	ТУ 21.20.24-004-83228278-2017 РУ №РЗН 2014/1392	Простыня с отверстием с адгезивным слоем Пеленка с адгезивным слоем
---	--	---

Покупные изделия, должны соответствовать указанным в таблице 28.

Таблица 28.

Наименование покупных изделий.	Нормативный документ и предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1.Бинты марлевые медицинские стерильные (16-ти типоразмеров) и нестерильные (33-х типоразмеров): Бинты марлевые медицинские стерильные размеры 5 м x 10 см, 7мx10см, 7мx14см.	ООО «Ткацкая фабрика 2», Россия ТУ 9393-001-32947348-2010 РУ№ФСР 2011/10227 (Состав: хлопок 100%, плотность 32±4 г/м ²)	Бинт марлевый медицинский
2.Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, размеры 5 м x 10 см, 7 м x 10 см, 7м x14см,	ООО "АПСАНА", Россия, РУ № ФСР 2008/03217 (Состав: хлопок 100%, плотность 32±4 г/м ²)	
3.Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: стерильные 5м x 10см, 7м x 14см	ООО "Элепром", Россия, РУ № ФСР 2012/14232 (Состав: хлопок 100%, плотность 32±4 г/м ²)	
4.Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, размеры 5 м x 10 см, 7м x14см	ООО "ПКФ ВераМед", Россия РУ № ФСР 2008/03226 (Состав: хлопок 100%,плотность 32±4 г/м ²)	
5.Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 Следующих типоразмеров: 5м x 10см, 7м x 14 см,	ООО "ХБК "Навтекс", Россия, РУ №РЗН 2015/2552 (Состав: хлопок 100%, плотность 32±4 г/м ²)	
6.Бинты эластичные фиксирующие самоприлипающие Matofix CONESIVE под товарным знаком matopat, размеры 15см x 4м, 12см x 4м, 10см x 4м, 8см x 4м, 6см x 4м, 15см x4,5м, 12см x4,5м, 10см x4,5м, 8см x 4,5м, 6см x4,5м, 15см x 5м, 12см x5м, 10см x5м, 8см x 5м, 6см x 5м.	АО «ТЗМО С.А.», Польша РУ№ФСЗ 2012/11570 (Состав: вискоза 40%, хлопок 30%, полиамид 30%)	Бинт самофиксирующий
7.Изделия медицинские эластичные компрессионные и фиксирующие: фиксирующие бинты эластичные, самофиксирующиеся: -Реха-haft (Пеха- хафт) , размеры 4 м x 4 см, 4 м x 6 см, 4мx8см, 4мx10см, 4мx12см	«Пауль Хартманн АГ», Германия РУ №ФСЗ 2011/09638 (Состав: вискоза 40%, хлопок 30%, полиамид 30%)	
8.Бинт марлевый самофиксирующий нестерильный «Кобинт» Размеры: 4 м x 6 см, 4мx8см, 4мx10см, 4мx12см	ООО «Новые Перевязочные Материалы», Россия ТУ 9393-007-74639918-2006 РУ №ФСР 2007/00790 (Состав: вискоза 40%, хлопок 30%, полиамид 30%)	
9.Бинты эластичные фиксирующие медицинские, варианты исполнений: - БЭФМ 60 мм x 4000 мм; - БЭФМ 80 мм x 4000 мм; - БЭФМ 100 мм x 4000 мм; - БЭФМ 120 мм x 4000 мм; - БЭФМ 150 мм x 4000 мм.	ООО "СМ-Рост", Россия ТУ 21.20.24-001-83998195-2017, РУ № РЗН 2017/6538 (Состав: хлопок 45%, полиамид 55%)	
10.Бинт когезивный самофиксирующий, в вариантах исполнения: -TENERIS Бинт когезивный самофиксирующий на тканевой основе (без латекса). Размер (длина в растянутом	ООО "ХЕЛСЛАБ", Россия ТУ 32.50.22-003-32459763-2022, РУ № РЗН 2023/21104 (Состав: вискоза 40%, хлопок 30%, полиамид 30%)	

состоянии): 4 см × 4 м; 6 см × 4 м; 8 см × 4 м; 10 см × 4,5 м;		
11.Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся) варианты исполнения: - Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся) белые, размером 4,0 м × 4,0 см; 4,0 м × 6,0 см; 4,0 м × 8,0 см; 4,0 м × 10,0 см; 4,0 м × 12,0 см; 5,0 м × 6,0 см; 5,0 м × 8,0 см; 5,0 м × 10,0 см; 5,0 м × 12,0 см	ООО "ХБК "Навтекс", Россия ТУ 9393-003-10715071-2017, ПУ № РЗН 2018/7444 (Состав: вискоза 40%, хлопок 30%, полиамид 30%)	
12.Лотки полимерные почкообразные ЛП-«КМИЗ»(160мм и 260мм)	ООО «Полимерные изделия», Россия ТУ 9452-111-05519988-2002 ПУ№ФСР 2011/10604 (Материал: полипропилен 100%)	Лоток полимерный
13. Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные «ГЕКСА», варианты исполнения: (трёхслойная, на завязках, голубая); - Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на резинке, голубая); -Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на завязках, голубая);	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия ТУ 9398-017-18603495-2010 ПУ №ФСР 2010/09436(состав: спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен; фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	
14.Маска медицинская из нетканого материала одноразовая	ООО «МАСКА», Россия ТУ 9398-001-64260744-2010 ПУ № ФСР 2010/08512 (состав: спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен; фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	
15.Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная	ООО «МЕДИКА Е» ТУ 32.50.50-001-75756402-2020 ПУ № РЗН 2020/10301 спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен; фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	
16.Одежда одноразовая медицинская, варианты исполнения: маска медицинская стандарт; маска медицинская классик;	ООО «КИТ», Россия ТУ 9398-001-65578626-2010 ПУ № ФСР 2010/09673 спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен; фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	
17.Перчатки латексные стерильные следующих исполнений: Перчатки латексные хирургические стерильные:6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.	ООО «Жасмин Мед», Россия ТУ 2514-001-50341858-2007 ПУ №ФСР 2007/00456 (материал: латекс натурального каучука(100%))	Перчатки хирургические
18.Перчатки хирургические и смотровые: Перчатки хирургические стерильные, размеры 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.	"Беар Сейф (Малайзия) Сдн. Вхд." Малайзия ПУ №ФСЗ 2008/01185 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
19..Перчатки хирургические и смотровые, стерильные следующих типоразмеров: -Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6,0; 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.	ООО «РусМедУпак», Россия ТУ 9398-002-54854000-2011 ПУ№ФСР 2011/12244 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
20.Перчатки медицинские диагностические	"ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия,	

(смотровые) и хирургические одноразовые "Велову" стерильные и нестерильные, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные анатомические неопудренные стерильные, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	РУ № ФСЗ 2012/12488, (материал: латекс натурального каучука(100%))	
21.Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, вариант исполнения: -Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	"Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай РУ № ФСЗ 2012/13220 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
22..Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, вариант исполнения: -перчатки латексные хирургические стерильные; - перчатки латексные хирургические нестерильные	"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/07368 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
23..Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные, вариант исполнения: Перчатки хирургические латексные стерильные, неопудренные	ООО "Ардейл-Импэкс", Россия ТУ 9398-001-53733748-2008 РУ №ФСР 2008/03089 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
24..Перчатки латексные стерильные следующих исполнений: Перчатки латексные смотровые стерильные: S(6-7), M(7-8), L(8-9)	ООО «Жасмин Мед», Россия ТУ 2514-001-50341858-2007 РУ №ФСР 2007/00456 (материал: латекс натурального каучука(100%))	Перчатки смотровые
25..Перчатки хирургические и смотровые, стерильные следующих типоразмеров: -Перчатки смотровые стерильные из натурального латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL	ООО «РусМедУпак», Россия ТУ 9398-002-54854000-2011 РУ№ФСР 2011/12244 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
26..Перчатки хирургические и смотровые, стерильные следующих типоразмеров: -Перчатки смотровые стерильные из синтетического латекса неопудренные №№ XS, S, M, L, XL	ООО «РусМедУпак», Россия ТУ 9398-002-54854000-2011 РУ№ФСР 2011/12244 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)	
27..Перчатки медицинские смотровые "Супермакс", латексные и нитриловые, варианты исполнения: -Перчатки медицинские смотровые, латексные	"Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/02932 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
28..Перчатки медицинские смотровые "Супермакс", латексные и нитриловые, варианты исполнения: -Перчатки медицинские смотровые, нитриловые	"Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.", Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/02932 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)	
29.Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой) размеры: XS, S, M, L	"Сарае Гигиена Малайзия Сдн. Бхд", Малайзия, РУ № ФСЗ 2012/11582 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)	
30..Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, варианты исполнения: -Перчатки смотровые нитриловые нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - синий, белый, фиолетовый, размеры XS, S, M, L	"Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)	
31..Перчатки медицинские смотровые и хирургические стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные, варианты исполнения: -Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый,	"Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэ Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2012/13220 (материал: латекс натурального каучука(100%))	

размеры 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	
32.Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, варианты исполнения: -Маленькие (S) 0-100 шт. -Средние (M) 0-100 шт. -Большие (L) 0-100 шт.	ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам РУ № РЗН 2017/6102 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)
33.Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, варианты исполнения: -Маленькие (S) 0-100 шт. -Средние (M) 0-100 шт. - Большие (L) 0-100 шт.	"ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани", Вьетнам, РУ № РЗН 2017/6105 (материал: латекс натурального каучука(100%))
34.Перчатки медицинские, вариант исполнения: Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Вепову», цвет: бирюзовый, синий, белый, голубой, зеленый, сиреневый, размеры: XS, S, M, L	«Макстер Глов Маньюфактуринг СДН БХД (229862-Х)», Малазия, РУ № ФСЗ 2011/10210 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)
35.Перчатки медицинские, вариант исполнения: Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Вепову», цвет: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L	«Макстер Глов Маньюфактуринг СДН БХД (229862-Х)», Малазия, РУ № ФСЗ 2011/10210 (материал: латекс натурального каучука(100%))
36. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Вепову" стерильные и нестерильные, варианты исполнения: -Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые, цвета: белый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, размеры: XS, S, M, L	"ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малазия, РУ № ФСЗ 2012/12488 (материал: латекс натурального каучука(100%))
37.Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые "Вепову" стерильные и нестерильные, варианты исполнения: -Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые, цвета: бирюзовый, синий, белый, голубой, сиреневый, зеленый, размеры: XS, S, M, L	"ТГ Медикал Сдн. Бхд.", Малазия, РУ № ФСЗ 2012/12488 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)
38.Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, , варианты исполнения: -перчатки латексные смотровые диагностические стерильные; -перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные	"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия РУ № ФСЗ 2010/07368 (материал: латекс натурального каучука(100%))
39.Перчатки медицинские нестерильные и стерильные, варианты исполнения: -перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные; - перчатки синтетические смотровые диагностические стерильные	"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия РУ № ФСЗ 2010/07368 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)
Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные нитриловые неопудренные текстурированные. Размеры XS, S, M, L, XL. Голубого цвета	"Топ Глоув Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ № РЗН 2017/5679 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)
40.Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, варианты исполнения: - Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: S. - Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: M. - Перчатки смотровые нитриловые,	"Жонхон Пулин Медикал Продактс Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2021/14392 (материал: латекс синтетического каучука(нитрил)100%)

неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: L.		
41.Перчатки хирургические и смотровые, вариант исполнения: - Перчатки латексные смотровые, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9;	«Веар Сейф Малайзия Сдн. Вхд.», Малайзия, РУ № ФСЗ 2008/01185 (материал: латекс натурального каучука(100%))	
42..Пинцеты полимерные одноразовые стерильные. Размеры:125мм, 150мм, 200мм	ООО «Полимерные изделия» Россия ТУ 9398-176-44942795-2005 РУ№ФСР 2010/07936 (Материал:полипропилен 100%)	Пинцет полимерный
43..Пинцеты медицинские SUYUN. Размеры:125мм, 150мм, 200мм	«Цзяньсу СУЮН Медикал Материалс Ко.Лтд» Китай РУ №ФСЗ 2010/06996 (полипропилен 100%)	
44. Повязка стерильная «matopat» Canula Plast из нетканого материала для фиксации канюль.Размеры: 5,8х8см., 5х7,2см.	АО «ТЗМО С.А.», Польша РУ№ФСЗ 2008/01690 (Основа : нетканый материал; впитывающая подушечка – вискоза 70% полиэстр 30%, покрыта микросеткой из нетканого материала; адгезивный слой-полиакрилатный клей)	Повязка для фиксации канюль
45. Повязки стерильные «matopat» Fixopore S из нетканого материала с впитывающей прокладкой. Размеры: 5х7,2см, 8х15см, 10х6см, 10х8см, 10х20см, 10х25см, 10х30см, 10смх35см.	АО «ТЗМО», Польша РУ№ФСЗ 2008/01691 (Основа : нетканый материал; впитывающая подушечка – вискоза 70% полиэстр 30%, покрыта микросеткой из нетканого материала; адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
46. Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные. Повязки пластырного типа Cosmopor® E steril / Космопор Е стерил (стерильная): размеры:7,2х5см, 10х6см, 15х6см, 10х8см, 15х8см, 20х8см, 20х10см, 25х10см, 35х10см, 15х9см	«Пауль Хартманн АГ», Германия РУ №ФСЗ 2011/10428 (Основа : нетканый материал; впитывающая подушечка – вискоза 70% полиэстр 30%, покрыта микросеткой из нетканого материала; адгезивный слой-полиакрилатный клей)	Повязка
47. Пластырь медицинский фиксирующий: Пластырь медицинский фиксирующий «Круподерм», размеры в см.6х7, 9х10, 9х15, 10х20, 10х25	«ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд», Китай РУ№ФСЗ 2010/07988 (Основа : нетканый материал; впитывающая подушечка – вискоза 70% полиэстр 30%, покрыта микросеткой из нетканого материала; адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
48. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные, варианты исполнения: -шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 2А «Луер»; -шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 5Б «Луер»; -шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 10Б «Луер»; -шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные, стерильные 20Б «Луер».	АО «РКЦ»Прогресс», Россия ТУ 9398-093-43892776-2005 РУ № ФСР 2010/08648 (Материал (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)	Шприц
49. Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные: шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: варианты исполнения: -Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 2А «Луер» -Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 5Б «Луер» -Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 10Б	ООО «Стерин», Россия ТУ 9398-004-11701993-2008 РУ № ФСР 2008/03253 (Материал (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)	

«Луер» - Шприцы инъекционные двухдетальные однократного применения стерильные: 20Б «Луер»	
50.Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по в следующих исполнениях: -шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 2А «Луер», вместимостью 2 см3; -шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5 см3; -шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10 см3; -шприцы инъекционные однократного применения, двухдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20см3; -шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 20Б «Луер», вместимостью 20см3; -шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 2А «Луер», вместимостью 2см3; -шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 5Б «Луер», вместимостью 5см3; -шприцы инъекционные однократного применения, трехдетальные 10Б «Луер», вместимостью 10см3.	АО «Медполимер ЛТД», Россия, ТУ 32.50.13-001-25597097-2005, РУ № ФСР 2010/07477 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
51..Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглами и без игл типа «Луер» и «Луер-Лок», стерильные, объемом: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл	ООО «ВЕБ-МЕДИКАЛ», Россия, ТУ 9398-001-28994901-2009, РУ № ФСР 2009/06214 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
52.:Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные, в следующих исполнениях: - трехдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,6х25; - трехдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38; - трехдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38; - трехдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной 0,8х38; -двухдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,45х10 до 0,7х40; -двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7х25 до 1,1х50; - двухдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной от 0,7х25 до 1,5х50	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", Россия ТУ 32.50.13-001-96673695-2017, РУ № ФСР 2010/07710 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
53..Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные или двухдетальные, стерильные типа "Луер" или "Луер Лок" объемами в мл: 2, 5, 10 и 20, в вариантах исполнения: -Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный или двухдетальный, стерильный типа "Луер" или "Луер Лок", в вариантах исполнения: - 2А, 5Б, 10Б, 20Б, «Луер»;	ООО "Группа СТК", Россия, ТУ 32.50.13-001-93599774-2017, РУ № ФСР 2010/08843 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
54.:Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения, варианты исполнения: -шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного	ООО "МПК" Елец", Россия, ТУ 9398-001-74017482-2010, РУ № ФСР 2008/03888 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)

применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер»; -шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью: 2; 5; 10; 20 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2; 5; 10; 20 ml «Луер»;	
55..Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трехкомпонентные иглами и без игл Vogt Medical, варианты исполнения: - Шприцы инъекционные безопасные однократного применения стерильные двух- и трех- компонентные с защитным чехлом Vogt Medical: Объёмами 2,0мл, с иглами и без игл : 0,6x25мм(23G); Объёмами 5,0мл, 10мл, 20мл с иглами и без игл: 0,8x40мм(21G).	«Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, РУ № РЗН 2016/3938 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
56..Шприцы однократного применения с иглой трехкомпанентные стерильные, варианты исполнений: -Шприцы инъекционные объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл.	«МедЭйм ЛЛС», США, РУ № ФСЗ 2011/10987 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
57:Шприцы инъекционные однократного применения с иглами, объемом: 5 мл, 10 мл, 20 мл,	"Зеджианг Хуафу Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09382 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
58.Шприцы одноразовые стерильные объемом 2 см3 (мл), 5 см3 (мл), 10 см3 (мл), 20 см3 (мл), с иглами и без,	"Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2009/03552 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
59.:Шприцы инъекционные одноразовые стерильные с иглами и без игл, объем: 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, варианты исполнения: -шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,6x30 мм (23G), объем: 2 мл; -шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 x 50 мм (21G), объем: 5 мл; -шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 x 40 мм / 0,8 x 38 мм (21G), объем: 10 мл; -шприц инъекционный стерильный одноразовый с иглой 0,8 x 40 мм / 0,8 x 38 мм (21G), объем: 20 мл; - шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 2 мл; - шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 5 мл; -шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 10 мл; - шприц инъекционный стерильный одноразовый без иглы, объем: 20 мл;	«Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплиансе Ко. Лтд», КНР, РУ № ФСЗ 2008/02301 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
60.Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, с иглами	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", Китай, РУ № ФСЗ 2011/09587 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)
61.Шприцы стерильные одноразовые с иглой, объемом: 2, 5, 10, 20, куб.см	«Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2007/00511 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень - 100% полипропилен)

62.Шприцы LEIKO медицинские инъекционные стерильные однократного применения объемом 2мл, 5мл, 10мл, 20мл, с иглами и без игл	"Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд.", Китай, РУ № ФСЗ 2010/08209 (цилиндр – 100% полипропилен, поршень – 100% полипропилен)	
63.Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт», следующих исполнений: Основа (подложка): нетканая. II. Размерный ряд, см: -нетканая основа (лейкопластырь в виде рулона намотанного без гильзы (катушки) или на картонную гильзу или пластмассовую катушку): - длина 1000,0 x ширина от 1,0 до 5,0 шаг 0,5; - длина 1000,0 x ширина свыше 5,0 до 30,0 шаг 1,0;	ООО "НПМ", Россия ТУ 21.20.24-004-74639918-2020, РУ №ФСР 2007/00789 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
64.Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, варианты исполнения: -на нетканой основе, пластырь-повязка NW рулонный, с впитывающей прокладкой и без нее, гипоаллергенный, размеры, см: 5x1000; 10x1000;	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР, РУ № ФСЗ 2008/01442 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
65.Лейкопластырь медицинский фиксирующий, в вариантах исполнения: На нетканой основе: -TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5x1000; 10x1000;	«Фармлайн ООО», Чешская Республика, РУ№ РЗН 2022/18988 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
66.Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, Вариант исполнения: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе	"ФармЛайн Лимитед", Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
67.Пластырь-повязка рулонный, фиксирующий медицинский нестерильный гипоаллергенный (липкий бинт), варианты исполнения: -На нетканой основе: 5,0 см x 10, 0 м; 10,0 см x 10,0 м;	ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, РУ № РЗН 2017/5942 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	Лейкопластырь фиксирующий
68.Пластырь медицинский фиксирующий, варианты исполнения: Пластырь медицинский фиксирующий КРУПОФИКС, размеры в см: - 5×1000, 10×1000	"ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.", Китай, РУ№ ФСЗ 2010/07988 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
69.Пластыри и повязки фиксирующие, варианты исполнения: -повязка фиксирующая, гипоаллергенная, пластырного типа КРУПОФИКС следующих типоразмеров (см): 5x1000; 10x1000;	АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", Россия ТУ 9393-004-61014306-2015, РУ №РЗН 2016/3848 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
70.Пластыри и повязки пластырного типа, стерильные и нестерильные, варианты исполнения: -Пластырь нетканый фиксирующий Omnifix® elastic/ Омнификс эластик (нестерильный), размеры: 10 м x 2,5 см, 10 м x 5 см, 10 м x 10 см,	"Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2011/10428 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	
71.Пластырь фиксирующий на катушках и в рулонах, нестерильный, варианты исполнения: - Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 5 см x 10 м - 1 шт. -Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 10 см x 10 м - 1 шт. -Пластырь Omnifix® Elastic фиксирующий	"Пауль Хартманн АГ", Германия, РУ № РЗН 2023/21505 (Материал –нетканый, адгезивный слой-полиакрилатный клей)	

на основе из нетканого материала (в рулоне), нестерильный, размер 2,5 см x 10 м - 2 шт.		
72.Бандаж гемостатический для гемодиализа (размер (мм) 30x45, 25x72, 30x72)	«Нипро Корпорейшн», Япония РУ №ФСЗ 2007/00721 (Основа : нетканый материал; впитывающая губка - целлюлоза 100%; адгезивный слой-полиакрилатный клей)	Бандаж гемостатический
73.Колпачок «Луер» однократного применения	СП «ФреБор» ООО, Республика Беларусь ТУ РБ 05838972.002-99 РУ №ФСЗ 2010/06417 (Материал: 100% полиэтилен низкого давления(ПНД))	Колпачок (заглушка)
74.Изделия медицинские для инфузионной терапии:Заглушка инфузионная	«Диспомед Витт оХГ», Германия РУ №ФСЗ 2011/10499 (Материал: 100% полиэтилен низкого давления(ПНД))	
75.Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил», варианты исполнения: 1. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Эконом, следующих типоразмеров 20x30см, 20x60см, 40x60см, 60x60см, 60x90см, 60x120см. 2. Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил» Оптима, следующих типоразмеров 20x30см, 20x60см, 40x60см, 60x60см, 60x90см, 60x120см., 90x170см. с крыльями, 90x180 см. с крыльями.	ООО «Медмил», Россия РУ №РЗН 2016/4992 ТУ 9398-002-11046488-2016 (Материал: покровный слой из гидрофильного нетканого материала, сорбционный слой из распушенной целлюлозы, распределительный слой из нетканого материала, защитный слой из полиэтиленовой пленки).	Пеленка впитывающая «Медмил»
76.Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые "Seni", варианты исполнения: -Пеленки Seni Soft: Seni Soft (40см x 60см, 60см x 60см, 90см x 60см, 90см x 170см с крыльями из нетканого материала); -Пеленки Seni Soft: Normal (60см x 60см, 90см x 60см); -Пеленки Seni Soft: Seni Soft Basic (40см x 60см, 60см x 60см, 90см x 60 см)	ООО "Белла", Россия, РУ № РЗН 2015/2475 (Материал: покровный слой из гидрофильного нетканого материала, сорбционный слой из распушенной целлюлозы, распределительный слой из нетканого материала, защитный слой из полиэтиленовой пленки).	Пеленка впитывающая «Seni»

17.6. Материалы для изделий, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 29

Таблица 29.

Наименование материала.	Поверх- ностная плотность, г/м2 не менее	Разрывная нагрузка, Н (кгс) не менее			
		в сухом состоянии		во влажном состоянии	
		в про-дольном напра- влении	в попе- речном напра- лении	в про- дольном напра- влении	в попе- речном напра- лении
1	2	3	4	5	6
1. Нетканый материал (Спан-мелт-спан (СМС), Спанлейс)	15,0	19,6 (2,0)	14,7 (1,5)	17,6 (1,8)	11,7 (1,2)
	20,0	29,4 (3,0)	19,6 (2,0)	24,5 (2,5)	17,6 (1,8)
	25,0	34,3 (3,5)	19,6 (2,0)	29,4 (3,0)	17,6 (1,8)
	35,0	39,2 (4,0)	24,5 (2,5)	34,3 (3,5)	19,6 (2,0)
	40,0	44,1 (4,5)	29,4 (3,0)	39,2 (4,0)	24,5 (2,5)
	45,0	44,1 (4,5)	29,4 (3,0)	39,2 (4,0)	24,5 (2,5)
	50,0	49,0 (5,0)	34,3 (3,5)	44,1 (4,5)	29,4 (3,0)
	55,0	49,0 (5,0)	34,3 (3,5)	44,1 (4,5)	29,4 (3,0)
	60,0	53,9 (5,5)	39,2 (4,0)	49,0 (5,0)	34,3 (3,5)

17.7. Масса Комплектов должна соответствовать параметрам, указанным в таблице 30

Таблица 30.

№	Наименование изделия	Масса, г
1	2	3
1	Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»	от 50,0 до 1500,0

2	Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»	от 10,0 до 2000,0
---	---	-------------------

- 17.8. Впитывающая способность при полном погружении тампона впитывающего и тампона марлевого должна быть не менее 0,5 г/шт.,
- 17.9. Поглотительная способность салфетки впитывающей, пеленки впитывающей должна быть не менее 5 г/г.
- 17.10. Скорость впитывания тампона впитывающего, тампона марлевого, салфетки впитывающей, пеленки впитывающей должна быть не более 10 с.
- 17.11. Сопротивление отслаиванию адгезивного слоя пеленки с адгезивным слоем; фиксирующего лейкопластыря; простыни с отверстием с адгезивным слоем; повязки для фиксации канюль; повязки; бандажа гемостатического от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.
- 17.12. Сорбционная емкость подушечки повязки для фиксации канюль, повязки, бандажа гемостатического должна быть не менее 1 капли /см².
- 17.13. Время смачивания подушечки повязки для фиксации канюль, повязки, бандажа гемостатического должна быть не более 10с.
- 17.14. Обратная сорбция пеленки впитывающей; салфетки впитывающей должна быть не более 5,0 г.
- 17.15. Удерживающая способность пеленки впитывающей; салфетки впитывающей должна быть не менее 0,35 г.
- 17.16. Комплект включает ассортимент следующих изделий:
- Пеленка впитывающая, Пеленка медицинская, Полотенце, Салфетка впитывающая, Салфетка медицинская*, должны быть прямоугольной или квадратной формы, цельнокроеные, края не обработаны.
- Пеленка с адгезивным слоем* должна быть квадратной или прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Пеленка по краю имеет адгезивный (липкий) слой.
- Фиксирующий лейкопластырь*, должен быть в виде рулона или полосок для фиксации повязок, катетеров, систем, дренажей
- Простыня с отверстием с адгезивным слоем* должна быть квадратной или прямоугольной формы, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни.
- Салфетка с разрезом* должна быть квадратной формы, края не обработаны. В готовом виде должна быть сложена в 4 слоя. Разрез расположен по центру от края одной стороны к центру. *Салфетка марлевая* должна быть квадратной или прямоугольной формы. В готовом виде должна быть сложена в 4-20 слоев. Края салфеток сложены вовнутрь.
- Тампон впитывающий* должен быть прямоугольной, треугольной или круглой формы, изготовленный из нетканого полотна Спанлейс.
- Тампон марлевый* должен быть прямоугольной, треугольной или круглой формы, изготовленный из марли.
- Бинт марлевый медицинский* это полоса марли в виде рулонов определенных размеров, изготавливается из ниточной марли.
- Бинт самофиксирующийся* должен быть в виде рулона. Фиксируется благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта между собой. Не требует применения дополнительных закрепляющих элементов.
- Лоток полимерный* должен быть почкообразной формы, изготовлен из полипропилена
- Пеленка с адгезивным слоем* должна быть квадратной или прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Пеленка по краю имеет адгезивный (липкий) слой.
- Фиксирующий лейкопластырь*, должен быть в виде рулона или полосок для фиксации повязок, катетеров, систем, дренажей
- Простыня с отверстием с адгезивным слоем* должна быть квадратной или прямоугольной формы, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни.
- Салфетка с разрезом* должна быть квадратной формы, края не обработаны. В готовом виде должна быть сложена в 4 слоя. Разрез расположен по центру от края одной стороны к центру.
- Салфетка марлевая* должна быть квадратной или прямоугольной формы. В готовом виде должна быть сложена в 4-20 слоев. Края салфеток сложены вовнутрь.
- Тампон впитывающий* должен быть прямоугольной, треугольной или круглой формы, изготовленный из нетканого полотна Спанлейс.
- Тампон марлевый* должен быть прямоугольной, треугольной или круглой формы, изготовленный из марли.
- Бинт марлевый медицинский* это полоса марли в виде рулонов определенных размеров, изготавливается из ниточной марли.
- Бинт самофиксирующийся* должен быть в виде рулона. Фиксируется благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта между собой. Не требует применения дополнительных закрепляющих элементов.
- Лоток полимерный* должен быть почкообразной формы, изготовлен из полипропилена
- Маска медицинская, 3-х слойная*, может быть на завязках или резинках, с обработанными краями или без. Маска оснащена фиксатором.
- Перчатки хирургические, перчатки смотровые* должны быть анатомической формы с расположением большого пальца в направлении ладони или универсальной (плоской) формы, одинаковой для обеих рук. Поверхность перчатки гладкая, без опудривания.
- Пинцет полимерный* изготовлен из полипропилена. Наличие насечки на внутренней стороне рабочих концов пинцета. Предназначен для захватывания перевязочного материала, ватных и марлевых тампонов при проведении диагностических и медицинских манипуляций.
- Повязка для фиксации канюль* предназначена для фиксации катетеров и канюль должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная. Основа изготовлена из нетканого материала с микропорами, с впитывающей подушечкой. С одной стороны нанесен адгезивный (липкий) слой. Имеет специальный надрез для иглы, благодаря которому повязку можно легко и быстро наложить.
- Повязка* должна быть прямоугольной формы. Изготовлена из нетканого материала. Подушечка находящаяся в центральной части повязки обладает впитывающими свойствами, покрыта микросеточкой, которая препятствует прилипанию повязки к ране и послеоперационным швам. С одной стороны нанесен адгезивный (липкий) слой.
- Шприц* состоит из прозрачного цилиндра и поршня. Поршень имеет удобный упор для пальцев, что обеспечивает комфорт и удобство для проведения процедуры инъекции одной рукой. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра -, препятствует случайному выкалыванию поршня из цилиндра. Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Шприцы могут комплектоваться инъекционными иглами однократного применения-
- Бандаж гемостатический* прямоугольной формы состоит из впитывающей губки с адгезивным слоем по периметру.
- Колпачок(заглушка)*, должен быть цилиндрической формы с внутренней резьбой для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий

Пеленка впитывающая «Медмил», «Seni» должна быть прямоугольной формы, многослойная: покровный слой из нетканого материала, сорбционный слой из распушенной целлюлозы, распределительный слой из нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой пленки. Слои и края соединены методом термоклеевого скрепления

17.17. Показатели, обеспечивающие функциональное назначение изделий, входящих в состав комплекта, должны соответствовать значениям, указанным в таблице в таблице 31

Таблица 31			
№ пп	Наименование изделия, входящего в состав комплекта	Наименование показателя	Значение показателя
	1	2	3
2	Пеленка медицинская; Пеленка с адгезивным слоем; Простыня с отверстием с адгезивным слоем; Салфетка медицинская;	Чистота микробная	не более 300CFU/дм ²
		Чистота в части инородных частиц	≤3,5 IPM
		Прочность на растяжение в сухом состоянии	не менее 15Н
		Адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля	не менее 0,35 Н/см
3	Перчатки смотровые	Тип	- из латекса натурального каучука - из нитрильного латекса
		Отделка	- текстурированный рисунок, нанесенный на какой-либо части или по всей поверхности перчатки; - гладкая поверхность; - опудренная поверхность; - поверхность без опудривания.
		Герметичность	герметичны
		Толщина материала на пальцах	не менее 0,08 мм - для гладких участков 0,11 мм - для текстурированных участков
		Толщина в центре ладони	не более 2,00 мм - для гладких участков 2,03 мм - для текстурированных участков
		Усилие при разрыве	не менее 7,0 Н - для латексных/ для нитриловых
		Удлинение при разрыве	650% - для латексных 500% - для нитриловых
4	Перчатки хирургические	Тип	- из латекса натурального каучука
		Отделка	- текстурированный рисунок, нанесенный на какой-либо части или по всей поверхности перчатки; - гладкая поверхность; - опудренная поверхность; - поверхность без опудривания.
		Герметичность	герметичны
		Толщина материала на пальцах	не менее 0,10 мм - для гладких участков 0,13 мм - для текстурированных участков
		Толщина в центре ладони	не менее 0,10 мм - для гладких участков 0,13 мм - для текстурированных участков
		Усилие при разрыве	не менее 12,5 Н - для латексных
		Удлинение при разрыве	700% - для латексных
5	Пинцет полимерный	Внешний вид	На поверхности пинцетов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, заусенцев, пор, выкошенных мест, расслоений, прижогов, а также не должно быть иных дефектов, связанных с функциональными характеристиками пинцета и иглодержателя.
		Состояние наружных поверхностей	На наружных поверхностях бранш пинцетов должны быть рифления. По согласованию с потребителем конструкция пинцетов может быть выполнена без рифлений.
		Упругость	Бранши пинцетов должны быть упругими.
		Боковое смещение рабочих частей	5% от ширины рабочей части

№ пп	Наименование изделия, входящего в состав комплекта	Наименование показателя	Значение показателя	
	1	2	3	
		Прилегание рабочих частей	Рабочие части пинцетов с нарезкой должны прилегать по всей длине нарезки при полном смыкании браншей или упора с поверхностью бранши, при этом концы губок не должны расходиться..	
6	Шприц	Размер	Длина шкалы до отметки номинальной вместимости	не менее 27 (26) мм – для шприцев номинальным объемом 2 мл 36 мм - для шприцев номинальным объемом 5 мл 44 мм - для шприцев номинальным объемом 10 мл 52 мм - для шприцев номинальным объемом 20 мл
			Минимальная длина выступания штока из цилиндра, от поверхности	не менее 9 мм — для шприцев номинальным объемом 2 мл;
			упора для пальцев до верха стержня штока:	12,5 мм — для шприцев номи- нальным объемом 5 мл и больше.
		Конусность	А - с концентрическим расположением наконечника для шприцев вместимостью 2, 5 мл. Б - с эксцентрическим расположением наконечника для шприцев вместимостью 5, 10, 20 мл.	
		Нагрузка на поршень	Поршень должен плавно перемещаться по всей градуированной длине цилиндра, при этом разность между максимальным и минимальным значениями нагрузки при перемещении поршня должна быть не более 5 Н.	

17.18. Требования к изготовлению:

Сшивание деталей изделий должно осуществляться нитками хлопчатобумажными по ГОСТ 6309, либо ультразвуковой либо термической сваркой (ширина шва 4 - 8 мм).

Методы обработки должны соответствовать промышленной технологии изготовления швейных изделий. Виды стежков, строчек и швов – в соответствии с ГОСТ 12807.

Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

Изделия не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

Изделия выпускаются стерильными. Стерилизация осуществляется газовым способом (оксидом этилена) по ГОСТ ISO 11135-2017.

Изделия должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Средний срок годности изделий 5 лет с даты стерилизации.

17.19. Маркировка.

Первичная упаковка изделий, подвергаемых стерилизации, должна быть снабжена товарной этикеткой, на которой печатным способом должно быть указано: наименование страны-изготовителя; наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес; обозначение настоящих технических условий; наименование комплекта, состав комплекта, размеры изделий с указанием материалов (при наличии), количество изделий; назначение; надпись «стерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом; надпись о недопустимости применения в случае нарушения целостности упаковки; дата стерилизации (месяц и две последние цифры года или месяц и год); вид стерилизации; номер серии (партии); слова «годен до...» (месяц и год); условия хранения; условия утилизации; номер и дата регистрационного удостоверения; штрих-код (при наличии). Примечание – Допускается наносить на упаковку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п.

Маркировка индивидуальных упаковок покупных стерильных изделий должна содержать следующую информацию: наименование страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, адрес; наименование изделия, размеры изделия (при наличии); дата стерилизации изделия; вид стерилизации изделия (при наличии); номер серии (партии) (при наличии); слова «годен до...» /срок годности; обозначение технических условий или стандарта, по которому выпускается данное изделие (при наличии); номер и дата регистрационного удостоверения. Примечание – Допускается нанесение на упаковку сведений о назначении, показаниях и противопоказаниях, составе, схематического изображения изделия, графических символов и рисунков, поясняющих условия хранения изделий, их утилизацию и т.п.

Каждая потребительская упаковка должна быть снабжена товарной этикеткой, на которой печатным способом должно быть указано: наименование страны-изготовителя; наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес; обозначение настоящих технических условий; наименование комплекта, состав комплекта, размеры изделий с указанием материалов (при наличии), количество изделий; назначение; надпись «стерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом; надпись о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской тары; надпись об однократности применения; дата стерилизации (месяц и две последние цифры года или месяц и год); вид стерилизации; номер серии (партии); слова «годен до...» (месяц и год); условия хранения; условия утилизации; номер и дата регистрационного удостоверения; штрих-код (при наличии). Примечание – Допускается наносить на упаковку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п.

На групповой таре изделий типографским способом должно быть указано: наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес; наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект; количество изделий в комплектах и количество комплектов; надпись «стерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом; номер серии (партии); дата стерилизации (месяц и две последние цифры года); годен до (месяц и две последние цифры года); условия хранения; масса брутто; штамп ОТК.

На упаковочном листе, вложенном в каждую транспортную тару должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, адрес; наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект; количество изделий в комплектах и количество комплектов; номер и фамилия упаковщика и дата упаковывания.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На поверхности транспортной тары должны быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом. Упаковка:

Покупные нестерильные изделия и изделия собственного производства, подлежащих стерилизации, в индивидуальных упаковках или без них, должны быть упакованы в первичную упаковку – пакеты стерилизационные марки «ПИК-ПАК» из многослойной полимерной пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединенной термощвами по ТУ 9398-004-86494572-2009, производства ООО «Бозон», Россия (состав: непрозрачная сторона: бумага марки BB973060 Sterikraft 2011 60±5г/м²; прозрачная сторона: пленка марки «Мультиген В мед» (состав материала полиэтилен-терефталат 20% / полипропилен марки Гомотекс М515М 80%), а затем подвергнуты стерилизации газовым способом (оксидом этилена) по ГОСТ ISO 11135. Параметры первичной упаковки, указаны в Приложении Ж..

Покупные стерильные изделия должны поставляться в индивидуальных упаковках с маркировкой предприятий-изготовителей данной продукции. Покупные стерильные изделия не подвергаются повторной стерилизации.

Первичная упаковка с покупными нестерильными изделиями и/или изделиями собственного производства, ранее подвергнутые стерилизации, и покупные стерильные изделия в индивидуальных упаковках с маркировкой предприятий-изготовителей данной продукции должны быть уложены в потребительскую упаковку – пакеты стерилизационные марки «ПИК-ПАК» из многослойной полимерной пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединенной термощвами по ТУ 9398-004-86494572-2009, производства ООО «Бозон», Россия (состав: непрозрачная сторона: бумага марки BB973060 Sterikraft 2011 60±5г/м²; прозрачная сторона: пленка марки «Мультиген В мед» (состав материала полиэтилен-терефталат 20% / полипропилен марки Гомотекс М515М 80%). Потребительская упаковка не подвергается повторной стерилизации.

Параметры первичных упаковок:

Размер (мм х мм)*	Масса (грамм)*
50x250	1,3
75x200	1,6
75x250	2,0
75x300	2,4
75x400	3,2
100x200	2,1
100x300	3,2
100x400	4,2
120x250	3,2
120x300	3,8
120x400	5,0
150x150	2,4
150x200	3,2
150x250	4,0
150x300	4,7
150x350	5,5
150x400	6,3
200x250	5,2

200x300	6,3
200x350	7,4
200x400	8,4
210x400	8,8
250x300	8,0
250x350	9,2
250x400	10,5
250x420	11,0
250x450	11,8
250x500	13,2
300x300	9,5
300x350	11,0
300x400	12,6
300x450	14,2
300x500	15,8
300x550	17,3
350x350	12,9
350x400	14,7
350x450	16,6
350x500	18,4
350x550	20,2
350x580	21,3
380x400	16,0
380x450	18,0
380x500	20,0
380x550	22,0
380x600	24,0

* Допустимые отклонения по размеру и массе не должны превышать $\pm 10\%$

Комплектность первичной упаковки, подвергаемой стерилизации и комплектность изделий в индивидуальных упаковках, не подвергаемых стерилизации

№	Наименование	Комплектность первичной упаковки, подвергаемой стерилизации	Комплектность изделий в индивидуальных упаковках, не подвергаемых стерилизации
1	Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур (для гемодиализа, перевязок, постановки катетеров) одноразовый стерильный «Барьер»	Пеленка впитывающая и/или Пеленка впитывающая «Медмил» - «Seni» не более 20шт; Пеленка медицинская - не более 10шт; Фиксирующий лейкопластырь - не более 20шт.; Салфетка впитывающая - не более 50шт.; Салфетка марлевая - не более 50шт; Салфетка медицинская и/или Салфетка с разрезом - не более 2 шт; Тампон впитывающий - не более 50шт; Тампон марлевый - не более 50шт; Бинт самофиксирующий - не более 3шт.; Лоток полимерный - не более 2шт.; Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках - не более 7шт.; Перчатки хирургические или смотровые - не более 7 пар;	Пинцет полиимсрный – не более 2шт.; Бинт марлевый медицинский - не более 2шт. Повязка для фиксации канюль - не более 2 шт.; Повязка - не более 5 шт.; Шприц - не более 5 шт. Бандаж гемостатический - не более 2шт. Колпачок (заглушка) не более 6 шт.
2	Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер»	Пеленка впитывающая - не более 20шт; Пеленка медицинская - не более 20шт; Пеленка с адгезивным слоем - не более 10шт; Фиксирующий лейкопластырь - не более 20шт.; Полотенце - не более 10шт; Простыня с отверстием с адгезивным слоем - не более 10шт; Салфетка впитывающая - не более 50шт.; Салфетка марлевая - не более 50шт; Салфетка медицинская - не более 20шт ; Салфетка с разрезом - не более 2 шт; Тампон впитывающий - не более 50шт; Тампон марлевый - не более 50шт. Бинт самофиксирующий - не более 3 шт.	Повязка- не более 5шт.; Шприц - не более 5 шт. Колпачок (заглушка) - не более 6 шт.

		Лоток - не более 2шт.; Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках - не более 7шт.; Перчатки хирургические или Перчатки смотровые - не более 7 пар;	
--	--	---	--

Первичная упаковка, подлежащая финишной стерилизации, должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 11607-2018

Толщина полимерной пленки для производства упаковки и отклонение по толщине должны быть 50 ± 5 мкм

Прочность при растяжении медицинской бумаги для производства упаковки должна быть:

- в продольном направлении MD - не менее 4,4 кН/м

- в поперечном направлении CD - не менее 2,2 кН/м.

Прочность при разрыве полимерной пленки для производства упаковки должно быть не менее 20Н/15мм.

Прочность сварного шва (усилие на разрыв) упаковки должна быть не менее 1,5Н/15мм

Потребительские упаковки должны быть уложены в групповую упаковку (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Примечание: Допускается в групповую упаковку укладывать изделия в первичных упаковках.

Групповые упаковки должны быть уложены в транспортную тару (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или по

ГОСТ Р 54463. Транспортная тара с комплектами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477. Примечание:

Допускается в транспортную упаковку укладывать изделия в потребительских упаковках.

Масса брутто одного места должна быть не более 20 кг. Примечание: допускается, по согласованию с заказчиком, применять для упаковки изделий другие виды материалов, обеспечивающих их сохранность и стерильность и разрешенных к применению в установленном порядке

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплекты могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту

19. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Комплектов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок годности изделий - 5 лет со дня стерилизации.

20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 3).

21. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации изделия должны быть нетоксичными и не вызывать местно-раздражающих и аллергических эффектов при контакте с неповрежденной кожей.

Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека.

Все работы по их производству должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией. Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Условия труда работающих – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань. При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Охрана окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.01.

Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

22. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА РИСКА, И ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ИХ ДО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ

Анализ рисков представлен в таблице Д1.

№ п/п	Опасная ситуация	Опасное событие		Тяжесть последствий	Вероятность	Защитные меры (меры снижения риска)	Остаточный риск
		Причина	Последствие				
1	Эксплуатация медицинского изделия в условиях, отличающихся от условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения установленных ТУ 9398-003-35167765-2016	1.Нарушение стерильности медицинского изделия 2.Нарушение показателей, обеспечивающих функциональное назначение медицинского изделия	Вероятность инфицирования пациентов и медицинского персонала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур вследствие микробной контаминации	Средняя	Низкая	Указание в эксплуатационной документации и на маркировке медицинского изделия условий эксплуатации, транспортирования и хранения	Отсутствует
2	Эксплуатация медицинского изделия в случае нарушения целостности потребительской упаковки;	Нарушение стерильности медицинского изделия	Вероятность инфицирования пациентов и медицинского персонала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур вследствие микробной контаминации	Средняя	Низкая	Указание в эксплуатационной документации и на маркировке медицинского изделия о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской упаковки	Отсутствует
3	Эксплуатация медицинского изделия после истечения срока ее годности	1.Нарушение стерильности медицинского изделия 2.Нарушение показателей, обеспечивающих функциональное назначение медицинского изделия	Вероятность инфицирования пациентов и медицинского персонала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур вследствие микробной контаминации	Средняя	Низкая	Указание в эксплуатационной документации и на маркировке медицинского изделия срока годности	Отсутствует
4	Многократная эксплуатация медицинского изделия	1.Нарушение стерильности медицинского изделия 2.Нарушение показателей, обеспечивающих функциональное назначение медицинского изделия	Вероятность инфицирования пациентов и медицинского персонала в ходе проведения хирургических манипуляций и процедур вследствие микробной контаминации	Средняя	Низкая	Указание в наименовании медицинского изделия в эксплуатационной документации и на маркировке кратность применения: одноразовое	Отсутствует
5	Эксплуатация медицинского изделия лицом, имеющим индивидуальную непереносимость материалов применяемых при изготовлении медицинского изделия	Попадание аллергена на кожные покровы	Аллергическая реакция	Низкая	Низкая	Указание в эксплуатационной документации противопоказаний для применения медицинского изделия: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав материалов, применяемых для изготовления медицинского изделия	Отсутствует

23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Обозначение документа	Название документ
ГОСТ 8.423-81	Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных

	пунктов.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1770-74	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3811 – 72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей.
ГОСТ 6309 – 93	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ Р 58144-2018	«Вода дистиллированная. Технические условия».
ГОСТ 7000-80	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 12026-76	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ ISO 11135 – 2017	Стерилизация медицинской продукции Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий
ГОСТ ISO 11737-2-2011	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации
ГОСТ 14192 – 96	Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15902.3 – 79	Полотна нетканые. Методы определения прочности.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 21239-93	Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 21241-89	Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ Р 50444 – 2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.
ГОСТ Р 53498-2019	Изделия медицинские пластырного типа. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ EN 13795-2-2011	Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 2. Методы испытаний
ГОСТ Р 52239-2004	Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора.
ГОСТ Р 52238-2004	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация.
ГОСТ 8074-82	Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 28840-90	Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
ГОСТ Р 51232-98	Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
ГОСТ ИСО 1924-1-96	Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 1. Метод нагружения с постоянной скоростью.
ГОСТ 14236-81	Пленки полимерные. Методы испытания на растяжение.
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
ТУ 2282-001-54788148-16	Материал нетканый СМС «Createx-Мед»
ТУ 8390-010-74582615-2009	Материал нетканый СМС
ТУ 9393-001-00320437-2010	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная
ТУ 8461-011-44881728-2010	Отрезы марлевые медицинские
ТУ 9393-004-55365591-2015	Марля медицинская отбеленная вискозная
ТУ 9393-001-32947348-2010	Бинты марлевые медицинские стерильные
ТУ 9393-007-74639918-2006	Бинт марлевый самофиксирующийся нестерильный «Кобинт»
ТУ 9452-111-05519988-2002	Лотки полимерные почкообразные ЛП-«КМИЗ»
ТУ 9398-017-18603495-2010	Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные «Гекса»
ТУ 9398-001-64260744-2010	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая
ТУ 2514-001-50341858-2007	Перчатки латексные стерильные
ТУ 9398-176-44942795-2005	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные
ТУ 9398-093-43892776-2005	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс»
ТУ 9398-004-11701993-2008	Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные
ТУ 21.20.24-004-74639918-2020	Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт»
ТУ РБ 05838972.002-99	Колпачок «Луер» однократного применения
ТУ 9398-002-11046488-2016	Пеленки впитывающие одноразовые «Медмил»
ТУ 8390-003-56176857-2007	Материал нетканый «Спанлейс»
ТУ 21.20.24-004-83228278-2017	Бинт липкий на полотне нетканом «БИНТЛИ»
ТУ 9398-004-86494572-2009	Пакеты стерилизационные «ПИК-ПАК»
РД 64-051-87	Инструкция. Контроль стерильности перевязочных материалов.
СанПиН 2.1.3684-21	«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
ГОСТ ISO 10993-7-2016	«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации»

ТУ 21.20.24-001-83998195-2017	Бинты эластичные фиксирующие медицинские
ТУ 32.50.22-003-32459763-2022	Бинт когезивный самофиксирующийся
ТУ 9393-003-10715071-2017	Бинты медицинские когезивные (самофиксирующиеся)
ТУ 32.50.50-001-75756402-2020	Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная
ТУ 9398-001-65578626-2010	Одежда одноразовая медицинская
ТУ 9398-002-54854000-2011	Перчатки хирургические и смотровые, стерильные
ТУ 9398-001-53733748-2008	Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные
ТУ 32.50.13-001-25597097-2005	Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные
ТУ 9398-001-28994901-2009	Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглами и без игл типа «Луер» и «Луер-Лок», стерильные
ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные
ТУ 32.50.13-001-93599774-2017	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные или двухдетальные, стерильные типа "Луер" или "Луер Лок"
ТУ 9398-001-74017482-2010	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения
ТУ 9393-004-61014306-2015	Пластыри и повязки фиксирующие
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	«Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»

Перечень приборов и оборудования, необходимых для контроля продукции.

Наименование	Основные характеристики или обозначение документа
Линейка измерительная металлическая	ГОСТ 427 – 75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
Весы	ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
Пинцет	ГОСТ 21241 – 89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.
Секундомер	ГОСТ 8.423 – 81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.
Ножницы	ГОСТ 21239 – 93 Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний.
Вода дистиллированная	ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия.
Стеклянная посуда	ГОСТ 25336 – 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.
Бумага фильтровальная	ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
Камера климатическая	Диапазон устанавливаемых температур $\pm 50^{\circ}\text{C}$ с погрешностью поддержания температуры $\pm 3^{\circ}\text{C}$, для влажности 100% с погрешностью измерения $\pm 3\%$.
Разрывные машины РТ-250М и и РМ-3	
Примечание - Допускается замена оборудования другим, обеспечивающим получение параметров с точностью не ниже требуемой	

24. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На территории Российской Федерации по вопросам, касающимся качества медицинских изделий:
Комплект медицинских изделий для хирургических манипуляций и процедур одноразовый стерильный «Барьер» по ТУ 9398-003-35167765-2016 обращаться по адресу: Общества с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Барьер»» (ООО «ПП «Барьер»)
Юридический адрес: Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 12, оф.6/3, телефон/факс.(343) 228-37-43, e-mail: sg@barrier.info.
Адрес места производства: Россия, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Александра Невского,4
Производитель: Общества с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Барьер»» (ООО «ПП «Барьер»)/Россия

Изменения в эксплуатационную документацию внесены 28.06.2024г

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

42 (сорок два) листов

Директор ООО «ПТ «Барьер»

Будлянский Г.В.

