

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Барьер»



Г.В.Будлянский

«10» октября 2016 г.

М.п.

Инструкция по применению

медицинского изделия

**Одежда и белье медицинские одноразовые стерильные
«Барьер» в комплектах и отдельных упаковках**

по ТУ 9398-001-35167765-2014

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда и белье медицинские одноразовые стерильные «Барьер» в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-001-35167765-2014

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для применения как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом в ходе хирургических и других инвазивных процедур с целью профилактики возникновения послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, при оказании лечебно-профилактической помощи, в терапевтических, акушерских, гинекологических, хирургических отделениях, операционных блоках, процедурных и перевязочных кабинетах, в инфекционных, педиатрических отделениях, а так же в патологоанатомических отделениях

Одежда и белье могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах, социальных учреждениях.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Предназначены для применения как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом в ходе хирургических и других инвазивных процедур с целью профилактики возникновения послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, при оказании лечебно-профилактической помощи, в терапевтических, акушерских, гинекологических, хирургических отделениях, операционных блоках, процедурных и перевязочных кабинетах, в инфекционных, педиатрических отделениях, а так же в патологоанатомических отделениях. По назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Противопоказания к применению данного изделия не выявлены.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- перед использованием по назначению стерильный комплект освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки.

Запрещается использовать стерильный комплект в следующих случаях:

- если истек срок годности данной партии
- если нарушена целостность упаковки
- если упаковка находится во влажном состоянии

При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Побочных действий при использовании данного изделия не выявлены.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Одежда и белье медицинские одноразовые стерильные «БАРЬЕР» в комплектах и отдельных упаковках совместимы со всеми медицинскими изделиями.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Влияние данного медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводилось, так как изделие не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека

10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Использовать по назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости.

В зависимости от вида, техники и объема оперативных вмешательств и хирургических процедур, при оказании специализированной медицинской помощи, возможно, использовать изделия в комплектах или отдельных упаковках.

Все варианты исполнения медицинского изделия имеют одно назначение и область медицинского применения:

Предназначены для применения как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования для предотвращения распространения возбудителей инфекционных заболеваний между пациентами и хирургическим персоналом в ходе хирургических и других инвазивных процедур с целью профилактики возникновения послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, при оказании лечебно-профилактической помощи, в терапевтических, акушерских, гинекологических, хирургических отделениях, операционных блоках, процедурных и перевязочных кабинетах, в инфекционных, педиатрических отделениях, а так же в патологоанатомических отделениях

Одежда и белье могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах, социальных учреждениях.

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

Перед использованием по назначению Одежду и белье медицинские одноразовые стерильные «Барьер» в комплектах и отдельных упаковках освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой потребительской упаковки. При отсутствии нарушений упаковку вскрывают для дальнейшего использования.

Время использования одежды и белья медицинские одноразовых стерильных «Барьер» в комплектах и отдельных упаковках:

- в течение времени проведения оперативного вмешательства, хирургической процедуры, манипуляции или обследования, приема родов;
- при проведении интенсивной терапии и реанимации – в течение суток;

10.1. Порядок использования одежды и белья медицинских одноразовых стерильных в отдельных упаковках:

- бахилы хирургические высокие применяются как медицинское изделие для покрытия тела, одеваются на ноги или обувь медперсонала или пациентов (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- бахилы хирургические низкие применяются как медицинское изделие для покрытия тела, одеваются на ноги пациента (сохраняют стерильность, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- брюки хирургические применяются как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала или пациента (предотвращают распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- держатель для шнура применяется как медицинское изделие для фиксации шнуров медицинского/хирургического оборудования, дренажных трубок, хирургического покровного материала (для управления распространением потенциально загрязненных биологических жидкостей организма из операционного поля, предотвращая распространение возбудителей инфекционных заболеваний, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции)
- карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный применяется как медицинское изделие в зависимости от техники выполнения хирургической операции или манипуляции (для сбора и управления распространением потенциально загрязненных биологических жидкостей организма из операционного поля, предотвращая распространение возбудителей инфекционных заболеваний или для размещения хирургических инструментов или перевязочного материала используется в ходе одной хирургической процедуры, операции)
- комбинезон применяется как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- конверт для новорожденного применяется как медицинское изделие (белье для покрытия тела и переноски одного новорожденного), новорожденный помещается внутрь конверта в родовой или операционной (используется в течение одних суток (или раньше до загрязнения));
- куртка хирургическая применяется как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-мешок медицинский защитный применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского инвентаря и оборудования в отделениях интенсивной терапии и реанимации, акушерских, гинекологических отделениях (для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток, или подлежит замене раньше при загрязнении);

-маска медицинская одевается медперсоналом или пациентами, время использования одноразовой медицинской маски составляет 3 часа, нельзя касаться закрепленной на лице маски, после снятия использованной маски нужно тщательно мыть руки с мылом, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос;

-наволочка применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского инвентаря в отделениях интенсивной терапии и реанимации, акушерских, гинекологических отделениях (для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток, или подлежит замене раньше при загрязнении);

-накидка медицинская применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента в акушерских, гинекологических, хирургических и других отделениях (одевается на тело пациента для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются в ходе одной хирургической процедуры или медицинской манипуляции);

-наматрачник применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского инвентаря и оборудования в отделениях интенсивной терапии и реанимации, акушерских, гинекологических отделениях (для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток, или подлежит замене раньше при загрязнении);

-нарукавники применяются как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала одевается медперсоналом/хирургическим персоналом поверх спецодежды (халата хирургического), служат дополнительной защитой от загрязнений, биологических и других жидкостей (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-операционная липкая лента применяется как медицинское изделие для фиксации шнуров медицинского/хирургического оборудования, дренажных трубок, хирургического покровного материала (для управления распространением потенциально загрязненных биологических жидкостей организма из операционного поля, предотвращая распространение возбудителей инфекционных заболеваний, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции)

-пеленка хирургическая с адгезивным слоем применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-пеленка хирургическая применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, покрытие на операционный стол, кресло для приема родов и по потребности, для сохранения стерильности (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-повязка защитная применяется как медицинское изделие для фиксации катетеров, дренажных трубок к кожным покровам пациента (для управления распространением потенциально загрязненных биологических жидкостей организма из операционного поля, предотвращая распространение возбудителей инфекционных заболеваний, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции)

-пододеяльник применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского инвентаря в отделениях интенсивной терапии и реанимации, акушерских, гинекологических отделениях (для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток, или подлежит замене раньше при загрязнении);

-покрывало на оборудование применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского/хирургического оборудования (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-покрытие хирургическое применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского/хирургического оборудования (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-простыня влагонепроницаемая с карманом применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского/хирургического оборудования, на операционный стол, кресло для приема родов и по потребности, для сохранения стерильности, карман применяется для сбора биологических жидкостей (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

-простыня медицинская применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, покрытие на операционный стол, кресло для приема родов и по потребности, для сохранения стерильности (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

- простыня на инструментальный столик (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, имеет выделенное операционное поле, впитывающая зона для удержания биологических жидкостей, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической операции с 2-мя доступами)
- простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, впитывающая зона для удержания биологических жидкостей, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, имеет выделенное операционное поле, карман и отвод для сбора и отвода жидкостей, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической операции с большим количеством биологических жидкостей (операция кесарево сечение) или операции и манипуляций в технике проведения которых используется большое количество жидкости (артроскопия, нейрохирургические операции и другие);
- простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, имеет выделенное операционное поле, впитывающая зона для удержания биологических жидкостей, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля фиксируется на теле пациента, имеет выделенное операционное поле покрытое липкой операционной пленкой, боковые карманы для размещения хирургических инструментов или перевязочного материала, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, имеет выделенное операционное поле покрытое липкой операционной пленкой, встроенное покрытие для ног, впитывающая зона для удержания биологических жидкостей, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) применяется как медицинское изделие для покрытия пациента для ограничения операционного поля, фиксируется на теле пациента, имеет выделенное операционное поле покрытое липкой операционной пленкой, впитывающая зона для удержания биологических жидкостей, перед применением с адгезивного слоя снимается защитное бумажное покрытие (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- простыня хирургическая влагонепроницаемая применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, покрытие на операционный стол, кресло для приема родов и по потребности, для сохранения стерильности (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- простыня хирургическая применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, покрытие на операционный стол, кресло для приема родов и по потребности, для сохранения стерильности (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- рубашка для роженицы (для пациента) применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента в акушерских, гинекологических, хирургических и других отделениях (одевается на тело пациента для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются в ходе одной хирургической процедуры или медицинской манипуляции);
- рубашка для новорожденного, применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента (новорожденного) в акушерских, родовых, хирургических и других отделениях (одевается на тело пациента

(новорожденного) для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток (или подлежит замене раньше при загрязнении);

- салфетка хирургическая применяется как медицинское изделие для покрытия пациента, для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей в ходе хирургических процедур или манипуляций для уменьшения распространения потенциально загрязненных биологических жидкостей организма из операционного поля (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- трусики процедурные применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента в акушерских, гинекологических, хирургических и других отделениях (одевается на тело пациента для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток (или подлежит замене раньше при загрязнении);
- фартук хирургический защитный применяется как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала одевается медперсоналом/хирургическим персоналом поверх спецодежды (халата хирургического), служит дополнительной защитой от загрязнений, биологических и других жидкостей (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до 70 применяется как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала, одевается медперсоналом/хирургическим персоналом поверх спецодежды (костюма хирургического), (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- халат хирургический с усиленной защитной зоной, размером от 40 до 70 применяется как медицинское изделие для покрытия тела медицинского/хирургического персонала одевается медперсоналом/хирургическим персоналом поверх спецодежды (костюма хирургического), усиленная зона переда и рукавов служит дополнительной защитой от загрязнений, биологических и других жидкостей (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- чехол на инструментальный столик применяется как медицинское изделие для покрытия инструментального стола (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- чехол на конечности пациента применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента (одевается на нижние конечности пациента, предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций, по-потребности);
- чехол на медоборудование применяется как медицинское изделие для покрытия медицинского/хирургического оборудования (предотвращает распространения возбудителей инфекционных заболеваний контактным путем, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- шапочка- «Шлем» применяется как медицинское изделие для покрытия тела медицинского персонала (одевается на голову медперсонала или пациента для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- шапочка для новорожденного применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента (новорожденного) в акушерских, родовых, хирургических и других отделениях (одевается на голову пациента (новорожденного) для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используются не более одних суток (или подлежит замене раньше при загрязнении);
- шапочка «Берет» применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента или медицинского персонала (одевается на голову медперсонала или пациента для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);
- шапочка «Колпак» применяется как медицинское изделие для покрытия тела пациента или медицинского персонала (одевается на голову медперсонала или пациента для профилактики послеоперационных осложнений и внутригоспитальных инфекций, используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинских манипуляций);

10.2. Порядок использования одежды и белья медицинских одноразовых стерильных в комплектах

10.2.1. Комплект белья медицинского /хирургического (универсальный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется при различных видах оперативных вмешательств и хирургических процедур, в том числе операций на бедре, полостных операций и других хирургических манипуляциях по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции или операции. Комплект вскрывается операционной медсестрой непосредственно в операционной:

-чехол на инструментальный столик, простыня на инструментальный столик, чехол на медоборудование, используются для покрытия оборудования, применяемого в ходе оперативного вмешательства и хирургических манипуляций;

- простыня хирургическая влагонепроницаемая, пеленка хирургическая, простыня хирургическая используются для покрытия операционного стола, применяемого в ходе оперативного вмешательства и хирургических манипуляций;
- простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной), пеленка хирургическая с адгезивным слоем используются для покрытия пациента для ограничения операционного поля;
- операционная липкая лента, держатель для шнура, повязка защитная, карман приемник применяются в зависимости от техники выполнения хирургической операции или манипуляции
- тампон впитывающий, применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности;
- чехол на конечности пациента применяется по потребности
- салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);

10.2.2. Комплект белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется в ходе хирургических процедур (в том числе гинекологических), манипуляций, приеме родов, обследований и по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции, обследовании, приема родов. Комплект вскрывается операционной медсестрой непосредственно в операционной:

- пеленка хирургическая с адгезивным слоем, применяется для покрытия пациента;
- пеленка хирургическая, простыня влагонепроницаемая с карманом, простыня хирургическая влагонепроницаемая, простыня медицинская применяются для покрытия операционного, процедурного стола, используемого в ходе оперативного вмешательства и медицинских манипуляций;
- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности;
- салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);

10.2.3. Комплект белья медицинского/хирургического для полостных операций (в том числе лапаротомии, торакотомии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»

применяется при различных видах оперативных вмешательств и хирургических процедур, в том числе для операции кесарево сечение, лапаротомии, аортокоронарного шунтирования, операции в условиях искусственного кровообращения и других хирургических манипуляциях по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции или операции. Комплект вскрывается операционной медсестрой непосредственно в операционной:

- халат хирургический без усиленной защитной зоны, халат хирургический с усиленной защитной зоной, шапочка «Берет», шапочка «Колпак», маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, - одеваются на тело медицинского/хирургического персонала;

- в зависимости от плана оперативного вмешательства и особенностей выполнения медицинских манипуляций для покрытия пациента применяется простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной), пеленка хирургическая с адгезивным или простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) или простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) или простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой или простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой

- пеленка хирургическая, чехол на медоборудование, простыня хирургическая применяются для покрытия оборудования и операционного стола, применяемого в ходе оперативного вмешательства и хирургических манипуляций;

- операционная липкая лента, держатель для шнура, карман приемник применяются в зависимости от техники выполнения хирургической операции или манипуляции

- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности;
- салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);

10.2.4. Комплект белья медицинского/хирургического для эндоскопических манипуляций (в том числе для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется при эндоскопических манипуляциях в том числе для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии, трансуретальной резекции и других хирургических процедур. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции. Комплект вскрывается операционной медсестрой непосредственно в операционной:

-халат хирургический без усиленной защитной зоны, халат хирургический с усиленной защитной зоной, шапочка «Берет», шапочка «Колпак», маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, бахилы хирургические высокие одеваются на тело медицинского/хирургического персонала;

-бахилы хирургические низкие, рубашка для роженицы (для пациента), чехол на конечности пациента одеваются на тело пациента при необходимости

- пеленка хирургическая, чехол на медоборудование, простыня хирургическая, чехол на инструментальный столик, простыня на инструментальный столик применяются для покрытия оборудования и операционного стола, применяемого в ходе оперативного вмешательства и хирургических манипуляций;

-в зависимости от плана оперативного вмешательства и особенностей выполнения медицинских манипуляций для покрытия пациента применяется простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной), пеленка хирургическая с адгезивным или простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) или простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) или простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой или простыня с отверстием, встроенное покрытие для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем или простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой

- операционная липкая лента, держатель для шнура, карман приемник, повязка защитная применяются в зависимости от техники выполнения хирургической операции или манипуляции

- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности;

-салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);

10.2.5.Комплект белья медицинского/хирургического для малоинвазивных вмешательств, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется при различных видах оперативных вмешательств и хирургических процедур, в том числе для кардиоваскулярных, ортопедических, офтальмологических, нейрохирургических операций, операции по имплантации электрокардиостимулятора, ангиографии и других медицинских манипуляциях по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции или операции. Комплект вскрывается операционной медсестрой непосредственно в операционной:

-халат хирургический без усиленной защитной зоны, шапочка «Берет», шапочка «Колпак», маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, бахилы хирургические высокие, бахилы хирургические низкие одеваются на тело медицинского/хирургического персонала;

- чехол на конечности пациента одевается на тело пациента при необходимости

- в зависимости от плана оперативного вмешательства и особенностей выполнения медицинских манипуляций для покрытия пациента применяется простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной), пеленка хирургическая с адгезивным или простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) или простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) или простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой или простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной)

- пеленка хирургическая, чехол на медоборудование, простыня хирургическая, чехол на инструментальный столик, простыня на инструментальный столик применяются для покрытия оборудования и операционного стола, применяемого в ходе оперативного вмешательства и хирургических манипуляций;

- операционная липкая лента, держатель для шнура, карман приемник, повязка защитная применяются в зависимости от техники выполнения хирургической операции или манипуляции

- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности

--салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);

10.2.6. Комплект белья медицинского/хирургического для покрытия инструментального стола (в том числе для маточного, сестринского), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется для покрытия инструментального, маточного, сестринского стола и по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции или операции. Комплект вскрывается операционной медсестрой в предоперационной:

- пеленка хирургическая, чехол на медоборудование, покрытие хирургическое, чехол на инструментальный столик, простыня на инструментальный столик, покрывало на оборудование применяются для покрытия оборудования, применяемого в ходе оперативного вмешательства и хирургических манипуляций;

- операционная липкая лента, карман приемник, салфетка хирургическая применяются по потребности

10.2.7.Комплект одежды медицинской/хирургической (в том числе для операции кесарево сечения, приема родов), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется при различных видах

оперативных вмешательств, хирургических процедур и медицинских манипуляций, в том числе для операций кесарева сечения и приема родов, и других медицинских манипуляциях по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции или операции. Комплект вскрывается операционной медсестрой:

- халат хирургический без усиленной защитной зоны, халат хирургический без усиленной защитной зоны, шапочка «Берет», шапочка «Колпак», шапочка «Шлем», маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, бахилы хирургические высокие, бахилы хирургические, брюки хирургические, комбинезон, куртка хирургическая, нарукавники, фартук хирургический защитный одеваются на тело медицинского/хирургического персонала применяются по потребности в зависимости от плана оперативного вмешательства, техники и особенности выполнения медицинских манипуляций.

10.2.8. Комплект одежды и белья медицинского для пациента (в том числе для роженицы, новорожденного), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется при различных видах оперативных вмешательств, хирургических процедур и медицинских манипуляций, в том числе для операций кесарева сечения и приема родов, и других медицинских манипуляциях по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры, манипуляции или операции. Комплект вскрывается операционной медсестрой/акушеркой:

- шапочка «Берет», шапочка «Колпак», шапочка для новорожденного, маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, бахилы хирургические высокие, бахилы хирургические низкие, брюки хирургические, куртка хирургическая, нарукавники, фартук хирургический защитный, халат хирургический без усиленной защитной зоны, рубашка для роженицы (для пациента), рубашка для новорожденного, накидка медицинская, трусики процедурные одеваются на тело пациента применяются по потребности в зависимости техники и особенности выполнения медицинских манипуляций.

- гинекологическая прокладка применяется для пациентов (в акушерских и гинекологических отделениях) для впитывания биологических жидкостей

- конверт для новорожденного применяется для покрытия тела и переноски одного новорожденного;

- простыня влагонепроницаемая с карманом применяется для покрытия медицинского/хирургического оборудования (операционного стола);

- простыня хирургическая влагонепроницаемая, простыня медицинская применяется для покрытия медицинского/хирургического оборудования (операционного стола);

10.2.9. Комплект белья медицинского (постельный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется в отделениях интенсивной терапии и реанимации, акушерских, гинекологических отделениях и по потребности. Комплект вскрывается медицинской сестрой/акушеркой.

- мешок медицинский защитный, наволочка, наматрачник, применяется для покрытия медицинского/хирургического инвентаря и оборудования;

- салфетка хирургическая, пододеяльник, простыня медицинская, пеленка хирургическая применяется для медицинского/хирургического инвентаря и оборудования или по потребности;

- накидка медицинская применяется для покрытия пациента(одевается на тело);

- простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной), пеленка хирургическая с адгезивным слоем, простыня с отверстием с адгезивным слоем используются для покрытия пациента для ограничения операционного поля;

10.2.10. Комплект белья медицинского/хирургического для проведения хирургических процедур (в том числе гемодиализа), одноразовый стерильный «Барьер» применяется при различных видах хирургических процедур, в том числе для гемодиализа и по потребности. Используется в ходе только одной хирургической процедуры. Комплект вскрывается операционной/процедурной медсестрой:

- шапочка «Колпак», маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, бахилы хирургические высокие, брюки хирургические, куртка хирургическая, нарукавники, фартук хирургический защитный, халат хирургический без усиленной защитной зоны, халат хирургический с усиленной защитной зоной, одеваются медицинским/хирургическим персоналом, применяются по потребности в зависимости техники и особенности выполнения хирургических процедур;

- шапочка «Берет», бахилы хирургические низкие, рубашка для роженицы (для пациента), накидка медицинская, одеваются на тело пациента, применяются по потребности в зависимости техники и особенности выполнения хирургических процедур;

- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности

- салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);

- пеленка хирургическая, простыня хирургическая, чехол на инструментальный столик, простыня медицинская применяются для покрытия оборудования, операционного стола применяемого в ходе хирургических процедур;

10.2.11. Комплект белья медицинского для диагностических манипуляций, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер» применяется при различных видах диагностических манипуляций, в том

числе с использованием тестов (типа «Амнишур», амниотест) и по потребности. Используется в ходе только одной диагностической манипуляций, медицинской манипуляции. Комплект вскрывается операционной/процедурной медсестрой или акушеркой:

- шапочка «Колпак», маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках, бахилы хирургические высокие, халат хирургический без усиленной защитной зоны, одеваются медицинским/хирургическим персоналом;
- шапочка «Берет», бахилы хирургические низкие, рубашка для роженицы (для пациента), одеваются на тело пациента, применяются по потребности в зависимости техники и особенности выполнения диагностических манипуляций;
- тампон впитывающий применяется для впитывания и сбора биологических жидкостей или по потребности;
- салфетка хирургическая применяется для покрытия медицинских/хирургических инструментов, медицинского/хирургического оборудования или по потребности (используется в ходе одной хирургической процедуры, операции или медицинской манипуляции);
- простыня медицинская применяется для покрытия медицинского/хирургического оборудования(стола);

11. СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок годности изделий - 5 лет с даты изготовления.

Не использовать после окончания срока годности.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°C до +40°C.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

13. УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

14. УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Не использованные одежду и белье медицинские одноразовые стерильные «БАРЬЕР» в комплектах и отдельных упаковках, специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

15. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «Барьер»

Юридический адрес: РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Гурзуфская,12,оф.6/3, телефон: .(343)228-37-43, факс: (343)228-37-43, e-mail:
sg@barrier.info.

Адрес места производства:

РФ, Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Александра Невского, 4

16. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Состав изделий в комплектах и их исполнение

1. Комплект белья медицинского /хирургического (универсальный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Держатель для шнура (длина х ширина в см: (27,0-33,0)х(2,7-3,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия – не более 2шт.;
2	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-110,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
3	Операционная липкая лента (длина х ширина в см:(27,0-95,0)х (2,7-11,0)) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
4	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
5	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
6	Повязка защитная (длина х ширина в см: размер 1- (9,0-11,0)х(27,0-33,0), размер 2- (6,5-7,5)х(9,0-11,0), размер 3-(4,5-5,5)х(6,5-7,5), размер 4-(9,0-11,0)х(14,0-16,0), размер 5-(14,0-16,0)х(27,0-33,0), размер 6-(14,0-16,0)х(18,0-22,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
7	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия – не более 2шт.;
8	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-380,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4 шт.;
9	Простыня хирургическая влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
10	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
11	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
12	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
13	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-290,0)х(45,0-290,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
14	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (45,0-150,0) х (45,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
15	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (6,0-190,0)х(6,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
2. Комплект белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
2	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
3	Простыня влагонепроницаемая с карманом (длина х ширина в см: (100,0-140,0)х(65,0-85,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;; производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
4	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
5	Простыня хирургическая влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
6	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;

7	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
8	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
3. Комплект белья медицинского/хирургического для полостных операций (в том числе лапаротомии, торакотомии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Держатель для шнура (длина х ширина в см: (27,0-33,0)х(2,7-3,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
2	Операционная липкая лента (длина х ширина в см:(27,0-95,0)х (2,7-11,0)) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
3	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
4	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
5	Повязка защитная (длина х ширина в см: размер 1- (9,0-11,0)х(27,0-33,0), размер 2- (6,5-7,5)х(9,0-11,0), размер 3-(4,5-5,5)х(6,5-7,5), размер 4-(9,0-11,0)х(14,0-16,0), размер 5-(14,0-16,0)х(27,0-33,0), размер 6-(14,0-16,0)х(18,0-22,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
6	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-380,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
7	Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
8	Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (25,0-400,0)х(25,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
9	Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-400,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия- не более 1шт.;
10	Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
11	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
12	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
13	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
14	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (6,0-190,0)х(6,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;

15	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках: маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А., Польша) -не более 5шт.;
16	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
17	Халат хирургический с усиленной защитной зоной, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
18	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
19	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
20	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-110,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
4. Комплект белья медицинского/хирургического для эндоскопических манипуляций (в том числе для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5пар;
2	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3пар;
3	Держатель для шнура (длина х ширина в см: (27,0-33,0)х(2,7-3,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
4	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-110,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 3шт.;
5	Операционная липкая лента (длина х ширина в см:(27,0-95,0)х (2,7-11,0)) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
6	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках: маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А., Польша) -не более 5шт.;
7	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
8	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
9	Повязка защитная (длина х ширина в см: размер 1- (9,0-11,0)х(27,0-33,0), размер 2- (6,5-7,5)х(9,0-11,0), размер 3-(4,5-5,5)х(6,5-7,5), размер 4-(9,0-11,0)х(14,0-16,0), размер 5-(14,0-16,0)х(27,0-33,0), размер 6-(14,0-16,0)х(18,0-22,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
10	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия – не более 2шт.;
11	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-380,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
12	Простыня с отверстием, адгезивным слоем , с карманом, отводом, липкой операционной пленкой (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более

	1 шт.;
13	Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (25,0-400,0)х(25,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1 шт.;
14	Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-400,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия- не более 1 шт.;
15	Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (200,0-400,0)х(200,0-400,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1 шт.; производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1 шт.;
16	Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1 шт.;
17	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
18	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 55,0-150,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1 шт.;
19	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30 шт.;
20	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30 шт.;
21	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2 шт.;
22	Халат хирургический с усиленной защитной зоной, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3 шт.;
23	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-290,0)х(45,0-290,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1 шт.;
24	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (45,0-150,0) х (45,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2 шт.;
25	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (6,0-190,0)х(6,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 4 шт.;
26	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5 шт.;
27	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5 шт.;
5. Комплект белья медицинского/хирургического для малоинвазивных вмешательств, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 пар;
2	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3 пар;
3	Держатель для шнура (длина х ширина в см: (27,0-33,0)х(2,7-3,0)), производства ООО «ПП «Барьер»,

	Россия - не более 2шт.;
4	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-110,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 3шт.;
5	Операционная липкая лента (длина х ширина в см:(27,0-95,0)х (2,7-11,0)) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
6	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matorat», стерильные в наборах и отдельных упаковках:маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А.», Польша) -не более 5шт.;
7	Повязка защитная (длина х ширина в см: размер 1- (9,0-11,0)х(27,0-33,0), размер 2- (6,5-7,5)х(9,0-11,0), размер 3-(4,5-5,5)х(6,5-7,5), размер 4-(9,0-11,0)х(14,0-16,0), размер 5-(14,0-16,0)х(27,0-33,0), размер 6-(14,0-16,0)х(18,0-22,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
8	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
9	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
10	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия – не более 2шт.;
11	Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-460,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
12	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-380,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
13	Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (25,0-400,0)х(25,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
14	Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-400,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия- не более 1шт.;
15	Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
16	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
17	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
18	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
19	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 10шт.;
20	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-290,0)х(45,0-290,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
21	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (45,0-150,0) х (45,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;

	«Барьер», Россия - не более 2шт.;
22	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (6,0-190,0)х(6,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
23	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
24	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.
6. Комплект белья медицинского/хирургического для покрытия инструментального стола (в том числе для маточного, сестринского), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-110,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
2	Операционная липкая лента (длина х ширина в см:(27,0-95,0)х (2,7-11,0)) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
3	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
4	Покрывало на оборудование (длина х ширина в см: (310,0-330,0)х(190,0-210), (170-190,0)х(90,0-110,0), (200,0-220,0)х(130,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
5	Покрывтие хирургическое (на оборудование) (длина х ширина в см: (65,0-340,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2шт.;
6	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия – не более 2шт.;
7	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
8	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-290,0)х(45,0-290,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
9	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (6,0-190,0)х(6,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 4шт.;
7. Комплект одежды медицинской/хирургической (в том числе для операции кесарево сечения, приема родов), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7пар;
2	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7пар;
3	Брюки хирургические, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
4	Комбинезон (длиной 170-190см.), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
5	Куртка хирургическая, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
6	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках:маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А.), Польша) - не более 7шт;
7	Нарукавники (длина в см: 45,0-55,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7пар;

8	Фартук хирургический защитный (длина х ширина в см (55,0-180,0) х (55,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
9	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
10	Халат хирургический с усиленной защитной зоной, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
11	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
12	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 7шт;
13	Шапочка- «Шлем» (высота в см: 30,0-36,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт;
8. Комплект одежды и белья медицинского для пациента (в том числе для роженицы, новорожденного), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия –не более 2пар;
2	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2пар;
3	Брюки хирургические, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия –не более 2шт.
4	Конверт для новорожденного (длина х ширина х высота в см: Размер 1(65,0-75,0)х(35,0-45,0)х(4,5-5,5), Размер 2 (38,0-42,0)х(28,0-32,0)х(4,5-5,5), Размер 3 (50,0-60,0)х(30,0-34,0)х (4,5-5,5), Размер 4 (50,0-60,0)х(35,0-45,0)х(4,5-5,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия-не более 1шт.;
5	Куртка хирургическая, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
6	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках:маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А.), Польша) -не более 2шт.;
7	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(130,0-150,0)х(160-180,0), (90,0-100,0)х(135,0-155,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
8	Нарукавники (длина в см: 45,0-55,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия –не более 2пар.;
9	Гинекологическая прокладка (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках: гинекологические прокладки РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А.), Польша) -не более 2шт.;
10	Простыня влагонепроницаемая с карманом (длина х ширина в см: (100,0-140,0)х(65,0-85,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
11	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
12	Простыня хирургическая влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
13	Рубашка для новорожденного (длина в см: 29,0-31,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;

14	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 55,0-150,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
15	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
16	Трусики процедурные (высота в см: 35,0-37,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
17	Фартук хирургический защитный (длина х ширина в см (55,0-180,0) х (55,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
18	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
19	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
20	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.
21	Шапочка для новорожденного (высота в см: 11,0-13,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
9. Комплект белья медицинского (постельный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Мешок медицинский защитный (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(27,0-33,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), (100,0-120,0)х(85,0-95,0), (120,0-140,0)х(100,0-120,0), (140,0-160,0)х(120,0-140,0), (160,0-180,0)х(140,0-160,0), (180,0-200,0)х(100,0-120,0), (200,0-220,0)х(120,0-140,0), (220,0-240,0)х(140,0-160,0), (240,0-260,0)х(160,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
2	Наволочка (длина х ширина в см: (9,0-95,0)х(9,0-95,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2 шт.;
3	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(130,0-150,0)х(160-180,0), (90,0-100,0)х(135,0-155,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
4	Наматрачник (длина х ширина в см.: (85,0-220,0)х (45,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
5	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
6	Пододеяльник (длина х ширина в см:(85,0-260,0) х (45,0-190,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
7	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 3шт.;
8	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
10. Комплект белья медицинского/хирургического для проведения хирургических процедур (в том числе гемодиализа), одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;

	«Барьер», Россия –не более 3пар;
2	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3пар;
3	Брюки хирургические, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
4	Куртка хирургическая, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
5	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках:маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А.», Польша) -не более 5шт.;
6	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(130,0-150,0)х(160-180,0), (90,0-100,0)х(135,0-155,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
7	Нарукавники (длина в см: 45,0-55,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия –не более 3пар.;
8	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
9	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
10	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
11	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-380,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4шт.;
12	Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (25,0-400,0)х(25,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1шт.;
13	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
14	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 55,0-150,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
15	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
16	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
17	Фартук хирургический защитный (длина х ширина в см (55,0-180,0) х (55,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 3шт.;
18	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 2шт.;
19	Халат хирургический с усиленной защитной зоной, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 3шт.;
20	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-290,0)х(45,0-290,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 1шт.;
21	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства

	ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
22	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
11. Комплект белья медицинского для диагностических манипуляций, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	
1	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия –не более 3пар;
2	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5пар;
3	Маска медицинская 3-х слойная на резинках или завязках (Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopat», стерильные в наборах и отдельных упаковках:маски, РУ№ ФСЗ 2011/09976, производства ТЗМО С.А.», Польша) -не более 5шт.;
4	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
5	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 30шт.;
6	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30шт.;
7	Шапочка «Берет» (высота в см:(13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
8	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
9	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5шт.;
10	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 55,0-150,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия – не более 1шт.

Состав изделий в отдельных упаковках

1	Бахилы хирургические высокие (высота х длина ступни в см: (35,0-95,0)х (33,0-50,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия –не более 5пар;
2	Бахилы хирургические низкие (высота х длина в см: (6,5-35,0)х (9,0-50,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5пар;
3	Брюки хирургические, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия -1шт.
4	Держатель для шнура (длина х ширина в см: (27,0-33,0)х(2,7-3,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 3шт.;
5	Карман-приемник 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный (длина х ширина в см: (15,0-110,0)х(15,0-85,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -не более 5шт.;
6	Комбинезон (длиной 170-190см.), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1шт.;
7	Конверт для новорожденного (длина х ширина х высота в см: Размер 1(65,0-75,0)х(35,0-45,0)х(4,5-5,5), Размер 2 (38,0-42,0)х(28,0-32,0)х(4,5-5,5), Размер 3 (50,0-60,0)х(30,0-34,0)х (4,5-5,5), Размер 4 (50,0-60,0)х(35,0-45,0)х(4,5-5,5), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1шт.;
8	Куртка хирургическая, размером от 40 до70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1шт.;
9	Мешок медицинский защитный (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(27,0-33,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), (100,0-120,0)х(85,0-95,0), (120,0-140,0)х(100,0-120,0), (140,0-160,0)х(120,0-140,0), (160,0-180,0)х(140,0-160,0), (180,0-200,0)х(100,0-120,0), (200,0-220,0)х(120,0-140,0), (220,0-240,0)х(140,0-160,0), (240,0-260,0)х(160,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1шт.;
10	Наволочка (длина х ширина в см: (9,0-95,0)х(9,0-95,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия -

	1 шт.;
11	Накидка медицинская (длина х ширина в см:(130,0-150,0)х(160-180,0), (90,0-100,0)х(135,0-155,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
12	Наматрачник (длина х ширина в см.: (85,0-220,0)х (45,0-180,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
13	Нарукавники (длина в см: 45,0-55,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 пара.;
14	Операционная липкая лента (длина х ширина в см:(27,0-95,0)х (2,7-11,0)) производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
15	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем (длина х ширина в см: (45,0-55,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(45,0-55,0), (65,0-75,0)х(65,0-75,0), (85,0-95,0)х(65,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4 шт.;
16	Пеленка хирургическая (длина х ширина в см:(55,0-65,0)х(55,0-65,0), (85,0-95,0)х(55,0-65,0), (55,0-65,0)х(35,0-45,0), (170,0-190,0)х (85,0-95,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 10 шт.;
17	Повязка защитная (длина х ширина в см: размер 1- (9,0-11,0)х(27,0-33,0), размер 2- (6,5-7,5)х(9,0-11,0), размер 3-(4,5-5,5)х(6,5-7,5), размер 4-(9,0-11,0)х(14,0-16,0), размер 5-(14,0-16,0)х(27,0-33,0), размер 6-(14,0-16,0)х(18,0-22,0) производства ООО «ПП «Барьер», Россия- 1 шт.;
18	Пододельник (длина х ширина в см:(85,0-260,0) х (45,0-190,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
19	Покрывало на оборудование (длина х ширина в см: (310,0-330,0)х(190,0-210), (170-190,0)х(90,0-110,0), (200,0-220,0)х(130,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
20	Покрывало хирургическое (на оборудование) (длина х ширина в см: (65,0-340,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
21	Простыня влагонепроницаемая с карманом (длина х ширина в см: (100,0-140,0)х(65,0-85,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 1 шт.;
22	Простыня медицинская (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
23	Простыня на инструментальный столик (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
24	Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-460,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
25	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-380,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
26	Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
27	Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (25,0-400,0)х(25,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
28	Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (45,0-400,0)х(45,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия- 1 шт.;
29	Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (200,0-400,0)х(200,0-400,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
30	Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) (длина х ширина в см: (55,0-400,0)х(55,0-360,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
31	Простыня хирургическая влагонепроницаемая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х (65,0-280,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
32	Простыня хирургическая (длина х ширина в см: (65,0-280,0)х(65,0-280,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
33	Рубашка для новорожденного (длина в см: 29,0-31,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
34	Рубашка для роженицы (для пациента) (длина в см: 55,0-150,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
35	Салфетка хирургическая (длина х ширина в см: (3,0-90,0)х(3,0-90,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 30 шт.;
36	Тампон впитывающий (прямоугольной, треугольной или круглой формы (длина х ширина в см: (2,7-3,3)х(2,7-3,3), (4,5-5,5)х(4,5-5,5), (6,5-7,5)х(6,5-7,5) или диаметром (2,7-3,3), (4,5-5,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 50 шт.;
37	Трусики процедурные (высота в см: 35,0-37,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;

38	Фартук хирургический защитный (длина х ширина в см (55,0-180,0) х (55,0-150,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
39	Халат хирургический без усиленной защитной зоны, размером от 40 до 70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
40	Халат хирургический с усиленной защитной зоной, размером от 40 до 70, производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
41	Чехол на инструментальный столик (длина х ширина в см: (45,0-290,0)х(45,0-290,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
42	Чехол на конечности пациента (высота х длина в см: (45,0-150,0) х (45,0-75,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 2 шт.;
43	Чехол на медоборудование (длина х ширина в см: (6,0-190,0)х(6,0-190,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 4 шт.;
44	Шапочка- «Шлем» (высота в см: 30,0-36,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
45	Шапочка для новорожденного (высота в см: 11,0-13,0), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - 1 шт.;
46	Шапочка «Берет» (высота в см: (13,0-17,0), диаметр (29,5-30,5)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;
47	Шапочка «Колпак» (высота в см: (14,0-18,0; 18,0-22,0; 24,0-28,0), диаметр (18,0-22,0)), производства ООО «ПП «Барьер», Россия - не более 5 шт.;

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

17.1. Изделия выпускаются стерильными. Стерилизация осуществляется газовым способом (оксидом этилена) по ГОСТ ISO 11135.

17.2. Маркировка.

Каждая потребительская упаковка должна быть снабжена товарным этикеткой, на котором печатным способом должно быть указано:

- наименование страны-изготовителя;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- обозначение настоящих технических условий;
- наименование изделия, размеры изделия с указанием материалов и количеством изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- наименование комплекта, состав комплекта, размеры изделий с указанием материалов, входящих в комплект и количеством изделий (для изделий в комплектах);
- назначение;
- надпись «стерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом;
- надпись о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской тары;
- дата стерилизации (месяц и две последние цифры года);
- вид стерилизации;
- номер серии;
- слова «годен до...» (месяц и год);
- условия хранения;
- условия утилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- штрих-код (при наличии).

Примечание – Допускается наносить на упаковку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п.

На групповой таре изделий типографским способом должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект (для изделий в комплектах);
- количество изделий в комплектах и количество комплектов (для изделий в комплектах);
- наименование изделия и размеры изделия (для изделий в отдельных упаковках);

- количество изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- надпись «стерильно», выделенная крупным шрифтом или другим цветом;
- номер серии;
- дата стерилизации (месяц и две последние цифры года);
- годен до (месяц и две последние цифры года);
- условия хранения;
- масса брутто;
- штамп ОТК.

На упаковочном листе, вложенном в каждую транспортную тару должно быть указано:

- 1) наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, адрес;
- 2) наименование комплекта, состав комплекта и размеры изделий, входящих в комплект (для изделий в комплектах);
- 3) количество изделий в комплектах и количество комплектов (для изделий в комплектах);
- 4) наименование изделия и размеры изделия (для изделий в отдельных упаковках);
- 5) количество изделий (для изделий в отдельных упаковках);
- 6) номер и фамилия упаковщика и дата упаковывания.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На поверхности транспортной тары должны быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от влаги». Допускается наклеивание манипуляционных знаков, выполненных типографским способом.

Упаковка. Изделия должны быть упакованы в потребительскую упаковку из многослойной полимерной пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги, соединенной термошвами по ТУ 9398-004-86494572-2009.

Потребительские упаковки должны быть уложены в групповую упаковку (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Групповые упаковки должны быть уложены в транспортную тару (ящики) из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или по ГОСТ Р 54463. Транспортная тара с комплектами должна быть оклеена лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Примечание: Допускается в транспортную упаковку укладывать изделия в потребительских упаковках.

1.7.4. Масса брутто одного места должна быть не более 20 кг.

Примечание: допускается, по согласованию с заказчиком, применять для упаковки изделий другие виды материалов, обеспечивающих их сохранность и стерильность и разрешенных к применению в установленном порядке.

17.3. В состав комплектов входят Изделия контурной и прямоугольной формы, изготовлены из нетканых полотен типа Спан-мелт-спан (СМС), Вуденпалп, Спанлейс, ламинированный Спанлейс, ламинированный Спанбонд, Сантейс, полиэтиленовая пленка.

17.4. Общий вид изделий (рисунки 1 – 42).

Рисунок 1. Халат хирургический (с усиленной защитной зоной или без нее). Обозначение «Барьер 9398.001.01».



Рисунок 2. Куртка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.02».

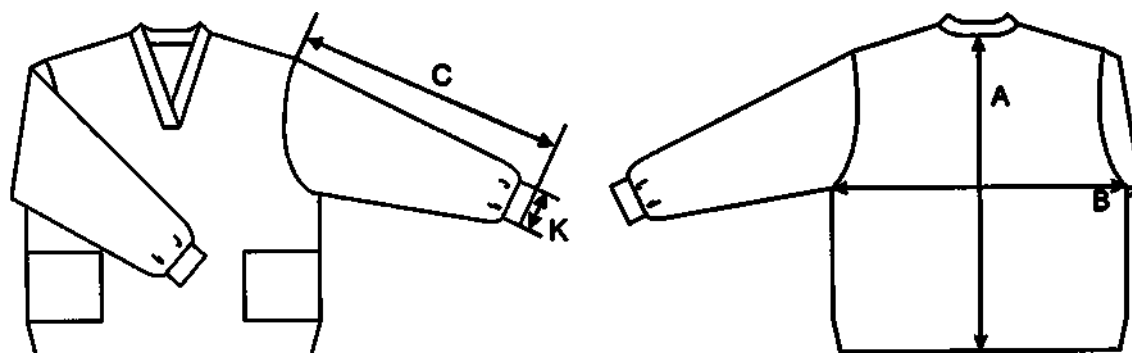


Рисунок 3. Брюки хирургические. Обозначение «Барьер 9398.001.03».

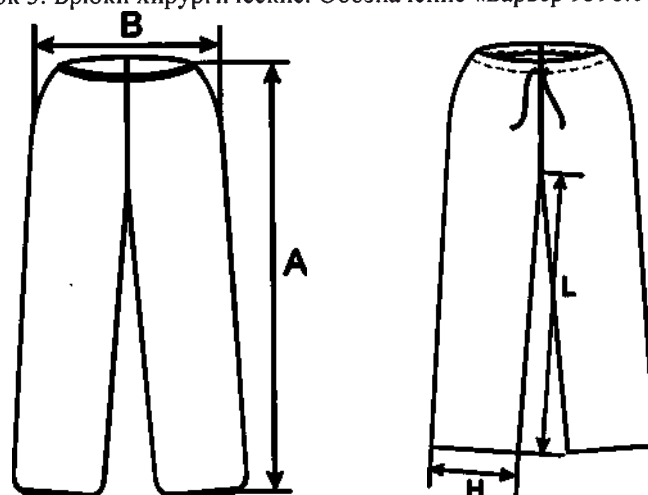


Рисунок 4. Комбинезон. Обозначение «Барьер 9398.001.04».

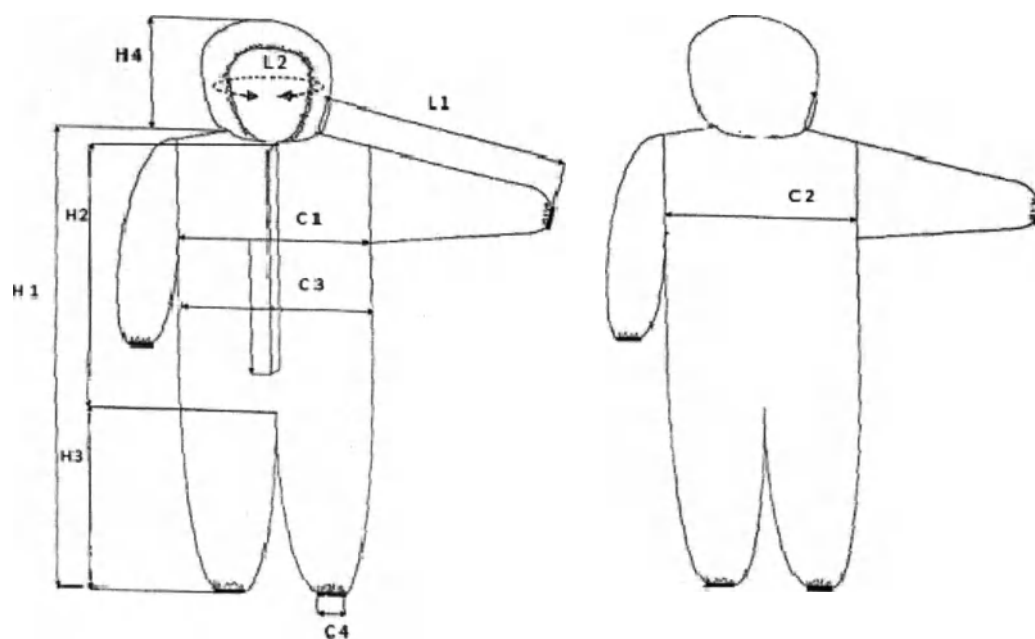


Рисунок 5. Фартук хирургический защитный. Обозначение «Барьер 9398.001.05».

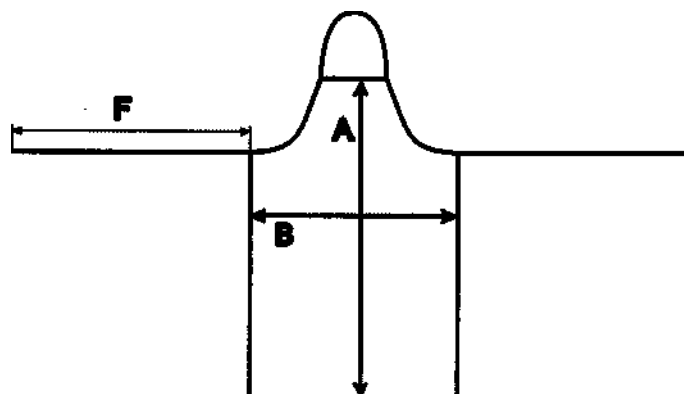


Рисунок 6. Шапочка «Колпак». Обозначение «Барьер 9398.001.06».

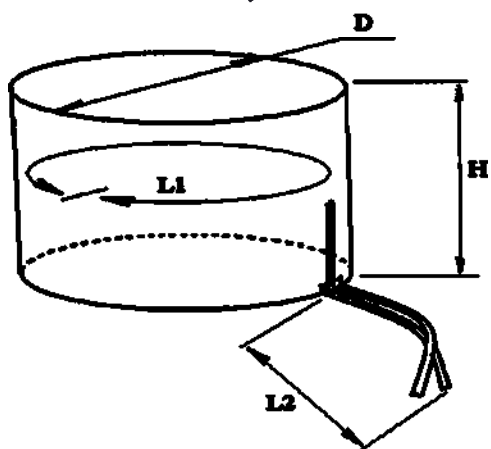


Рисунок 7. Шапочка «Берет». Обозначение «Барьер 9398.001.07».

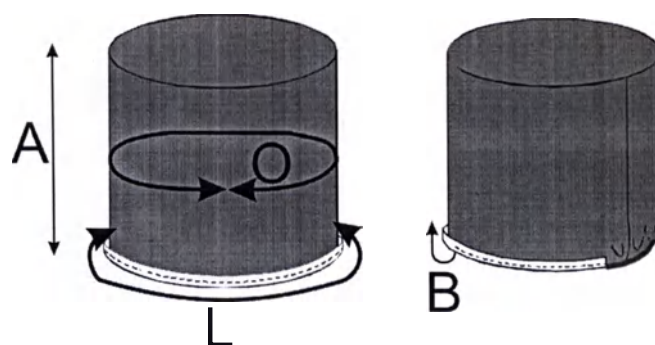


Рисунок 8. Шапочка «Шлем». Обозначение «Барьер 9398.001.08».

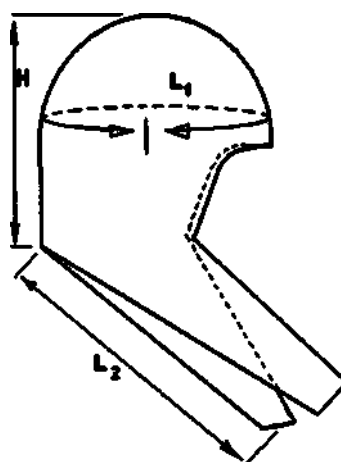


Рисунок 9. Шапочка «Шапочка для новорожденного». Обозначение «Барьер 9398.001.09».

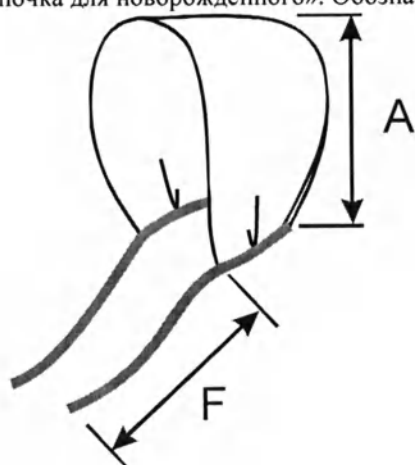


Рисунок 10. Бахилы хирургические низкие. Обозначение «Барьер 9398.001.10».

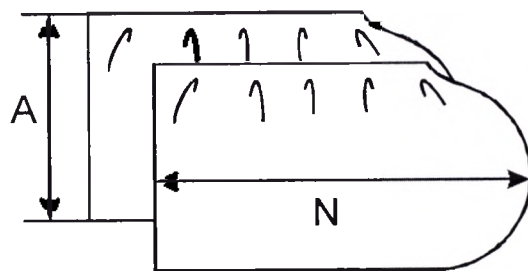


Рисунок 11. Бахилы хирургические высокие. Обозначение «Барьер 9398.001.11».

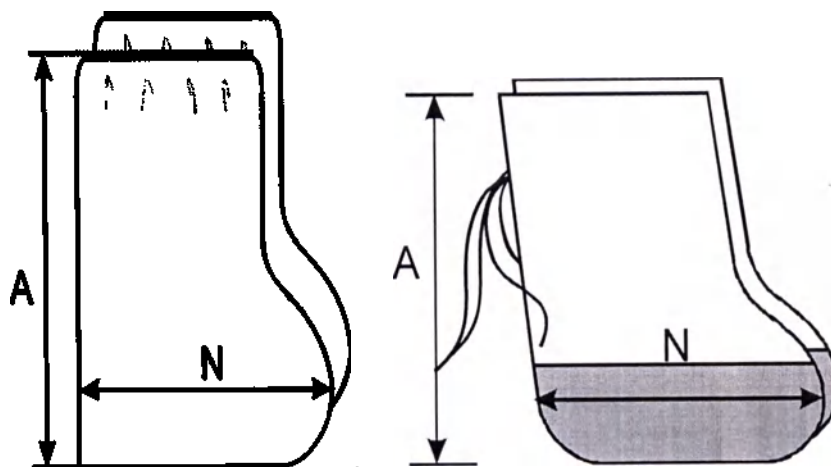


Рисунок 12. Чехол на конечности пациента. Обозначение «Барьер 9398.001.12».

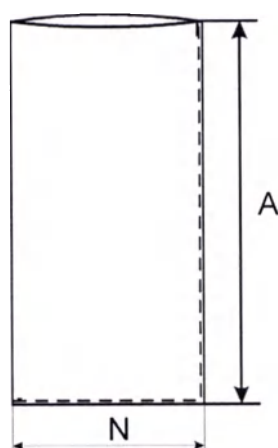


Рисунок 13. Нарукавники. Обозначение «Барьер 9398.001.13».

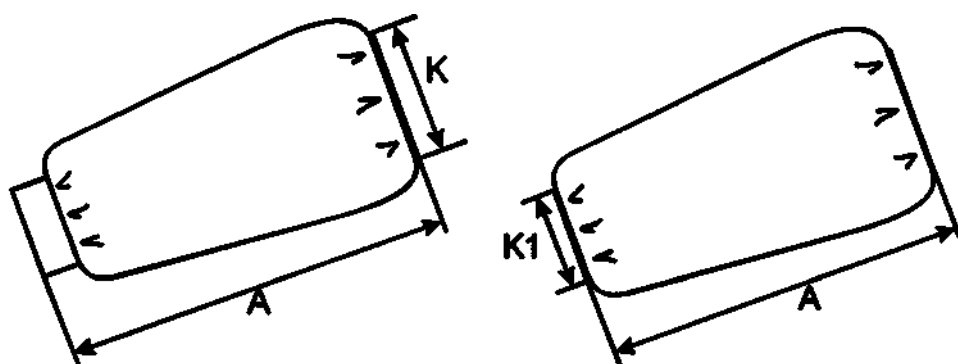


Рисунок 14. Рубашка для роженицы (для пациента). Обозначение «Барьер 9398.001.14».

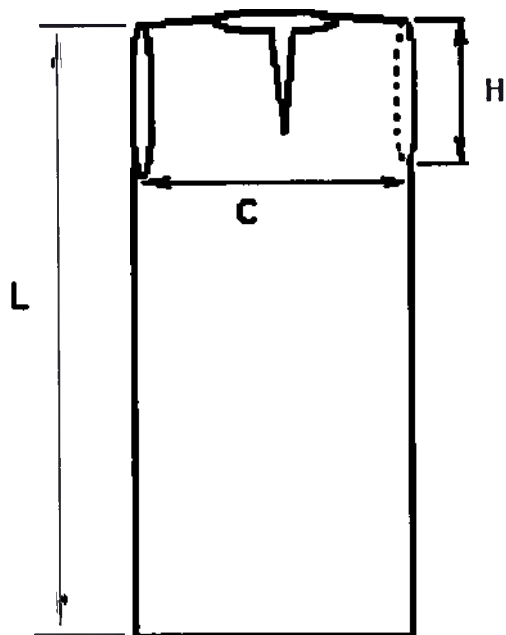


Рисунок 15. Рубашка для новорожденного. Обозначение «Барьер 9398.001.15».

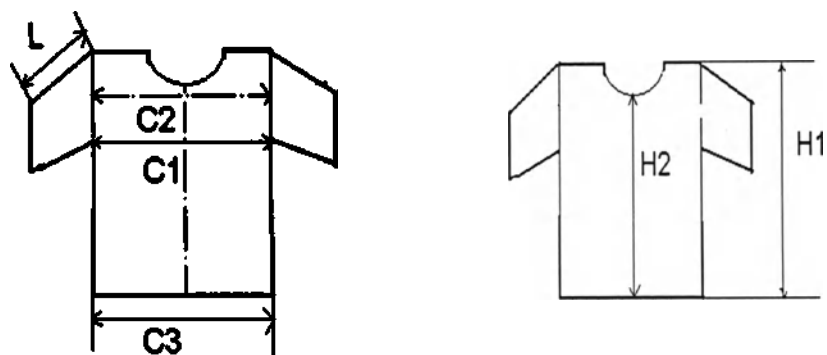


Рисунок 16. Трусики процедурные. Обозначение «Барьер 9398.001.16».

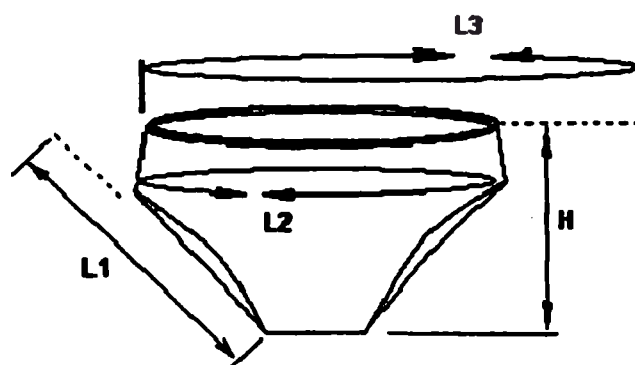


Рисунок 17. Накидка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.001.17».

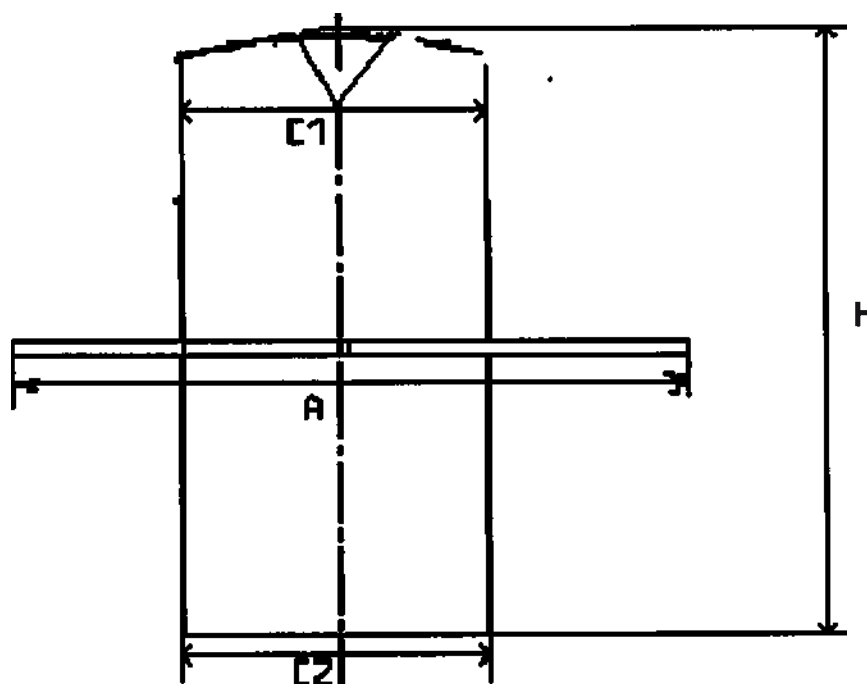


Рисунок 18. Простыня хирургическая влагонепроницаемая. Обозначение «Барьер 9398.001.18».

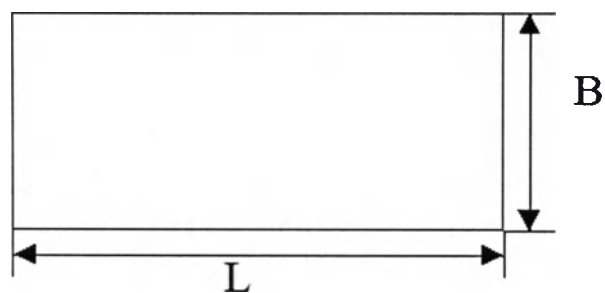


Рисунок 19. Тампон впитывающий. Обозначение «Барьер 9398.001.19».

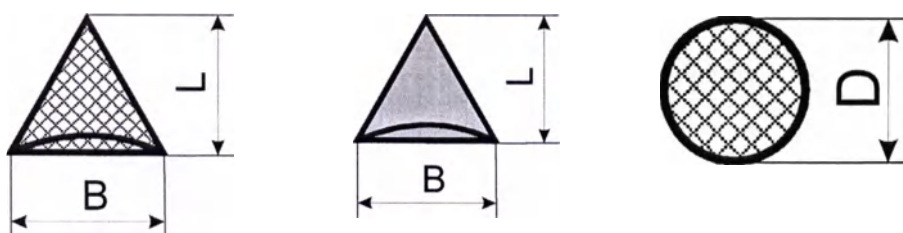


Рисунок 20. Пододеяльник. Обозначение «Барьер 9398.001.20».

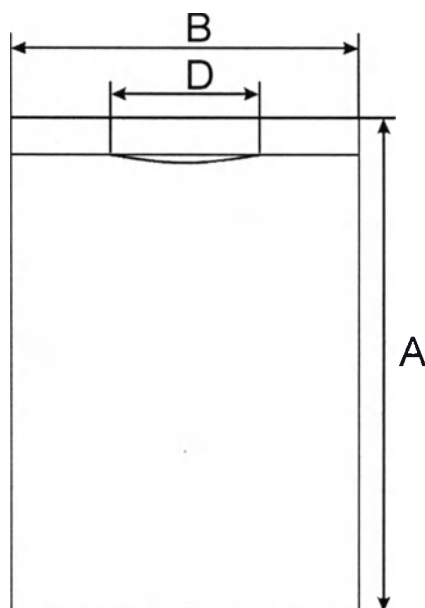


Рисунок 21. Наволочка. Обозначение «Барьер 9398.001.21».

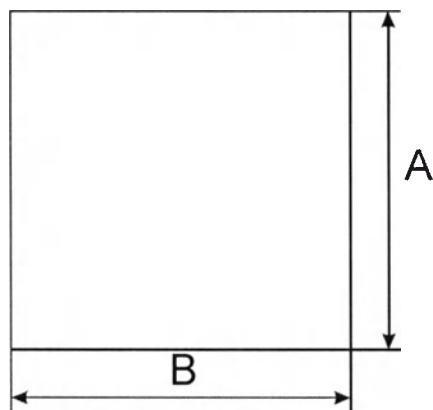


Рисунок 22. Наматрацник. Обозначение «Барьер 9398.001.22».

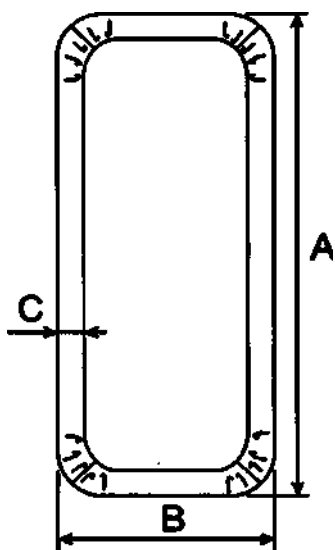


Рисунок 23. Простыня медицинская. Обозначение «Барьер 9398.001.23».

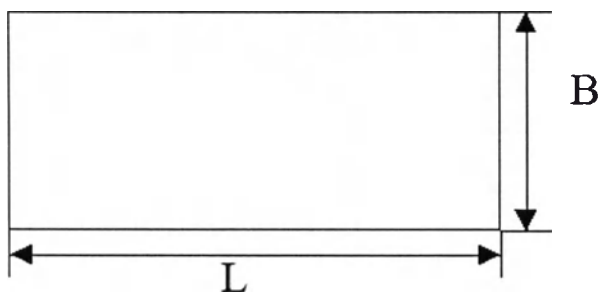


Рисунок 24. Чехол на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.001.24».
Чехол на медоборудование. Обозначение «Барьер 9398.001.25».

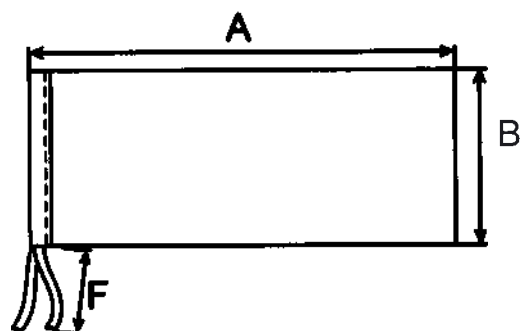


Рисунок 25. Операционная липкая лента. Обозначение «Барьер 9398.001.26».

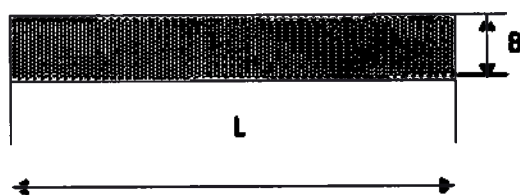


Рисунок 26. Держатель для шнура. Обозначение «Барьер 9398.001.27».

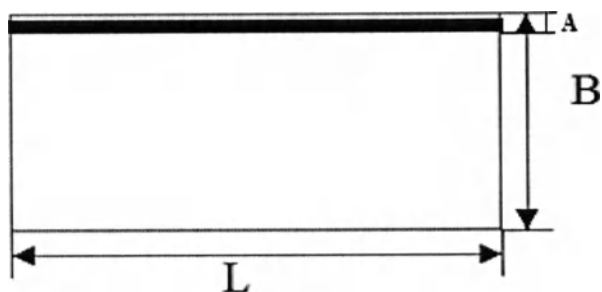


Рисунок 27. Карман-приемник. Обозначение «Барьер 9398.001.28».

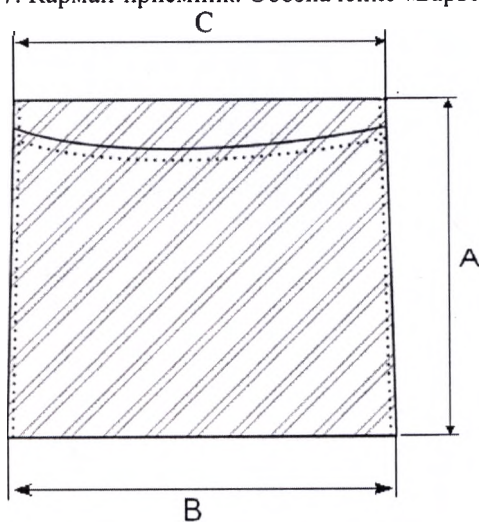


Рисунок 28. Мешок медицинский защитный. Обозначение «Барьер 9398.001.29».

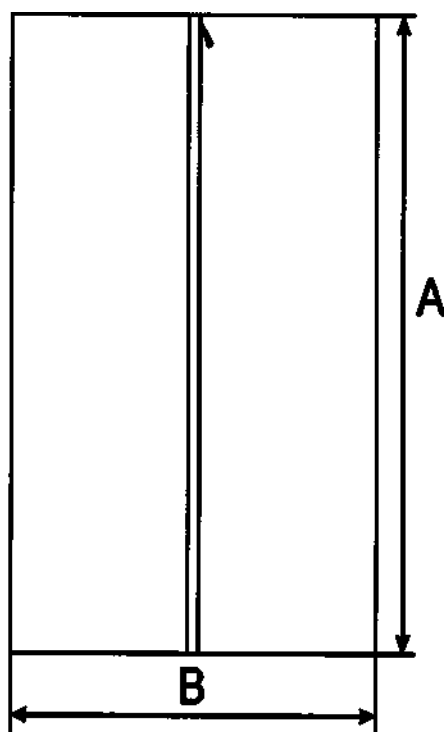


Рисунок 29. Конверт для новорожденного Обозначение «Барьер 9398.001.30 ».

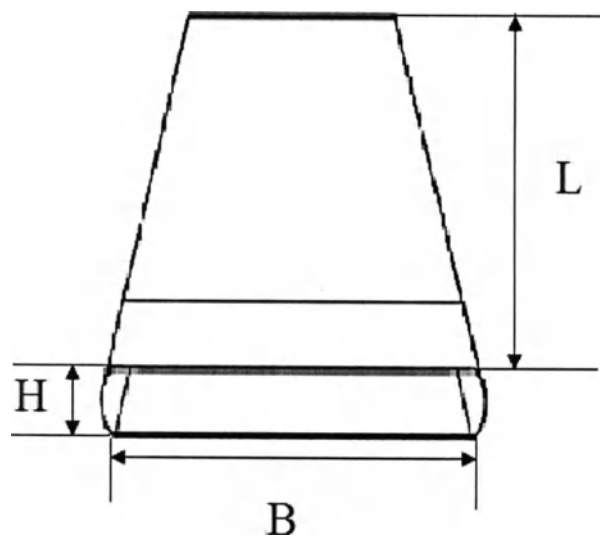


Рисунок 30. Салфетка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.31».

Покрывало на оборудование Обозначение «Барьер 9398.001.32»

Пеленка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.33»

Простыня хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.34».

Простыня на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.001.35 ».

Покрытие хирургическое (на оборудование). Обозначение «Барьер 9398.001.36»

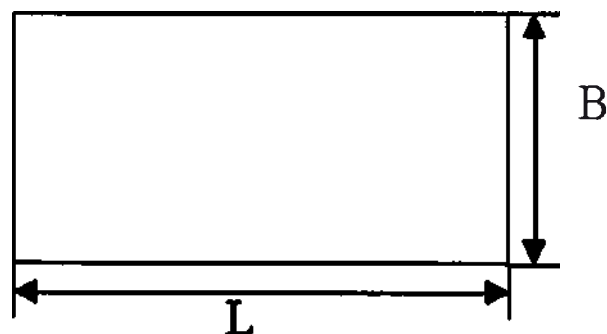


Рисунок 31. Простыня влагонепроницаемая с карманом. Обозначение «Барьер 9398.001.37».

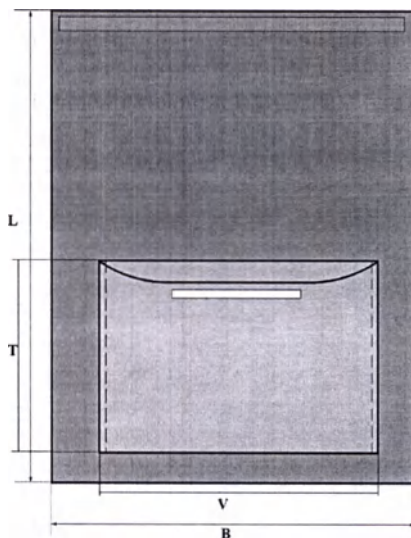


Рисунок 32. Повязка защитная. Обозначение «Барьер 9398.001.38»

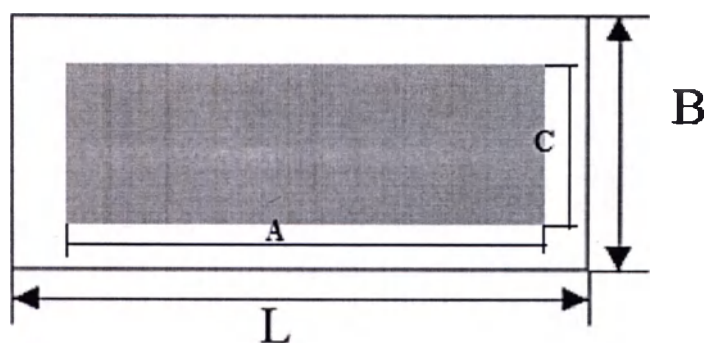


Рисунок 33. Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной). Обозначение «Барьер9398.001.39»

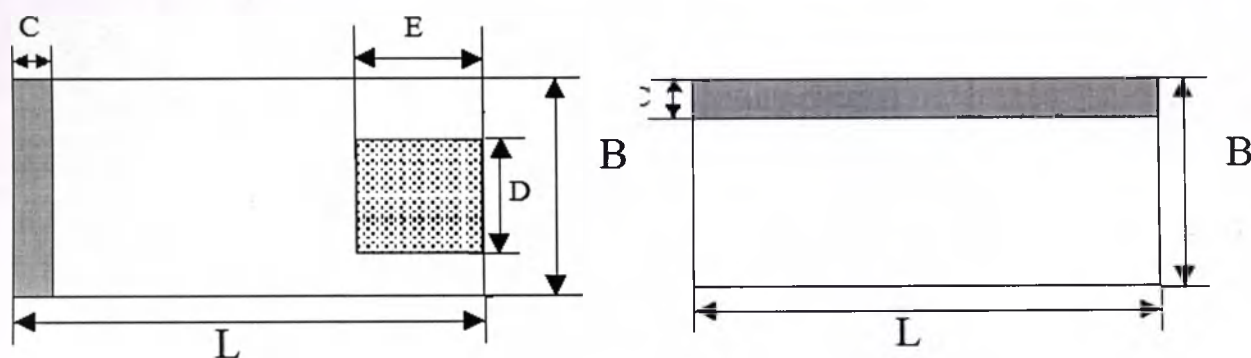


Рисунок 34. Простыня с отверстием, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной). Обозначение «Барьер 9398.001.40»

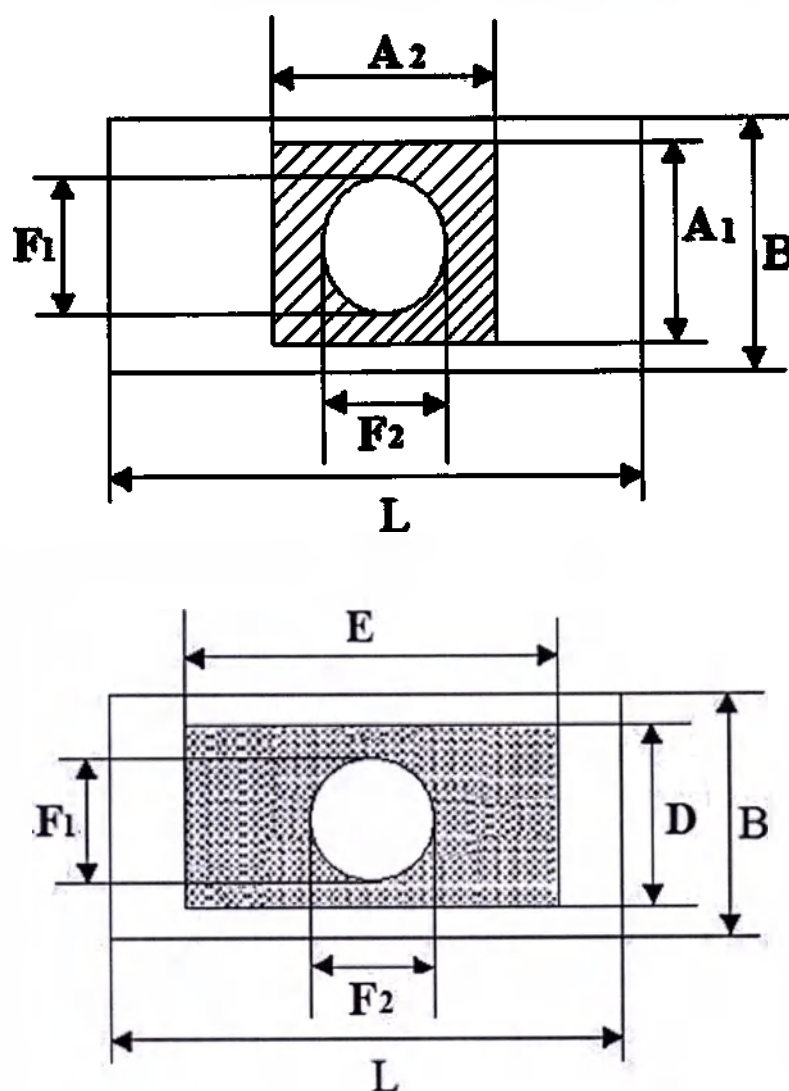


Рисунок 35. Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной).

Обозначение «Барьер 9398.001.41 ».

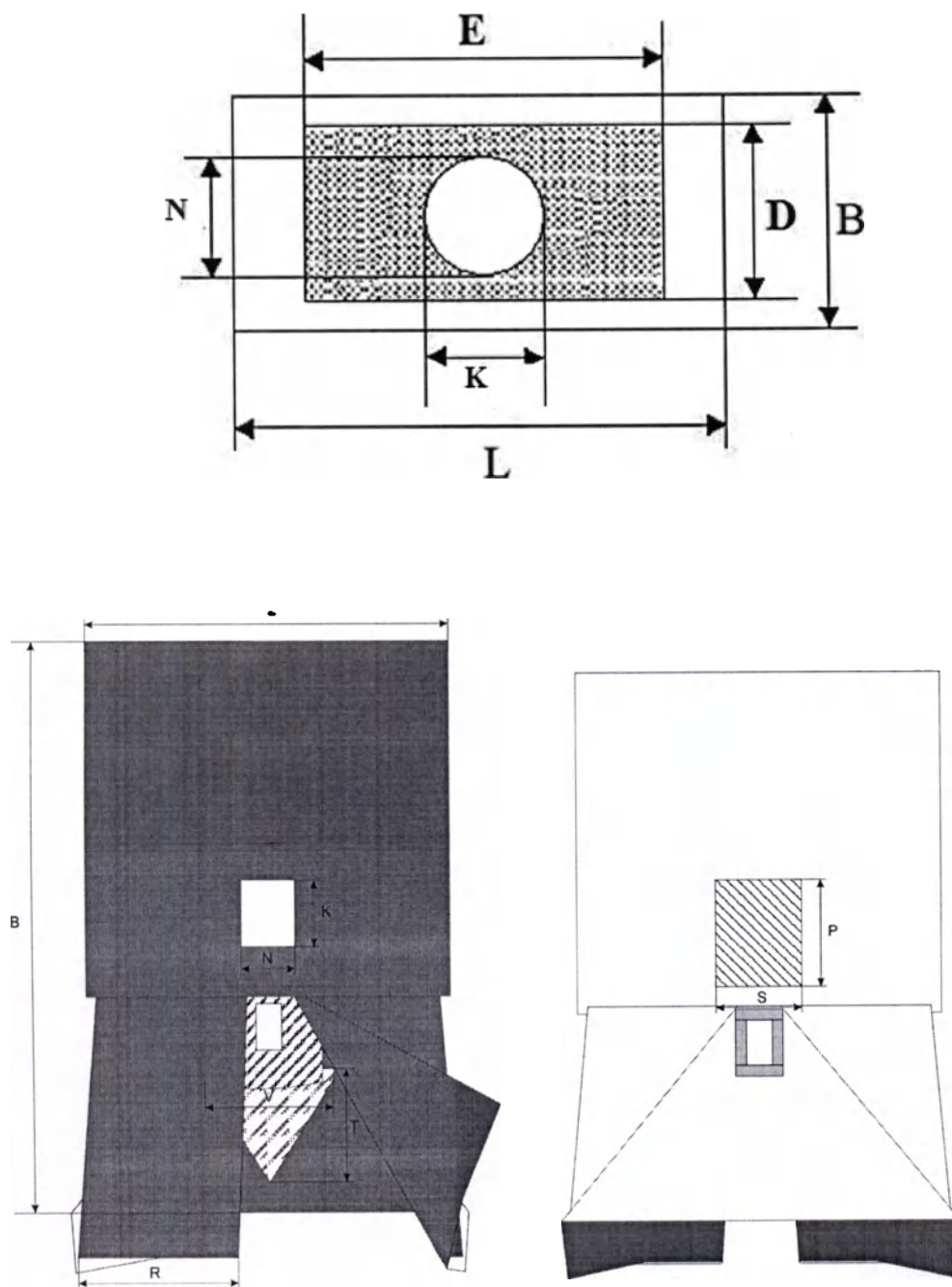


Рисунок 36. Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной). Обозначение «Барьер 9398.001.42».

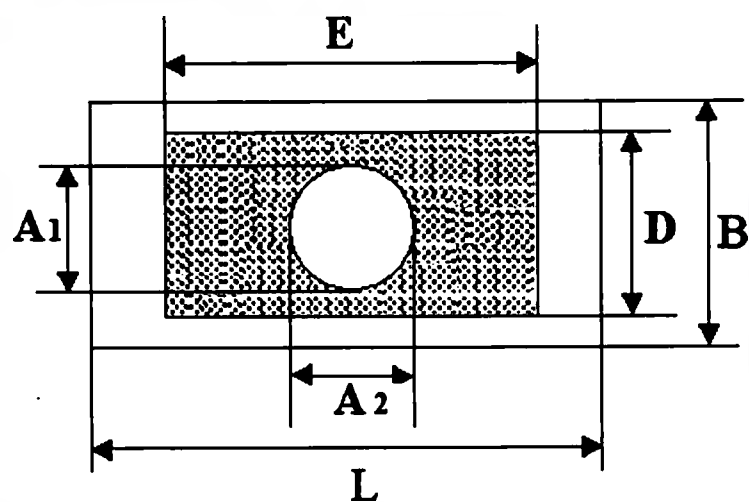
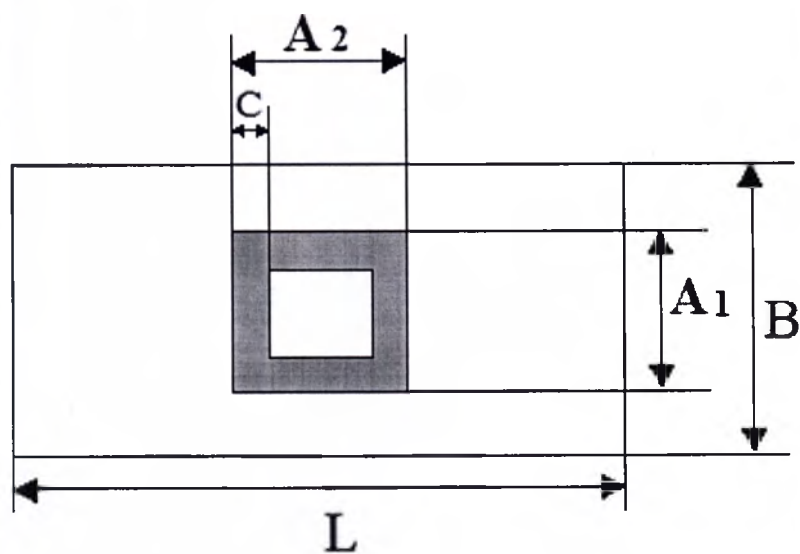
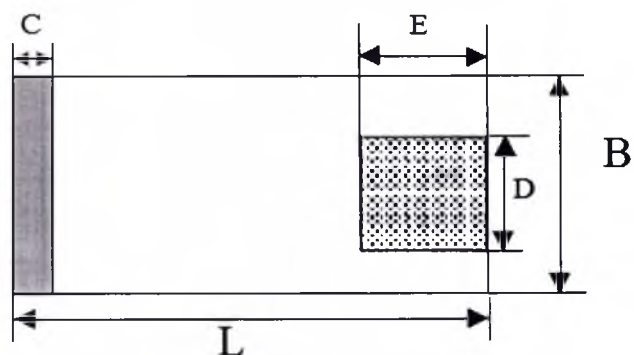


Рисунок 37. Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой, (может быть с впитывающей зоной).

Обозначение «Барьер 9398.001.43».

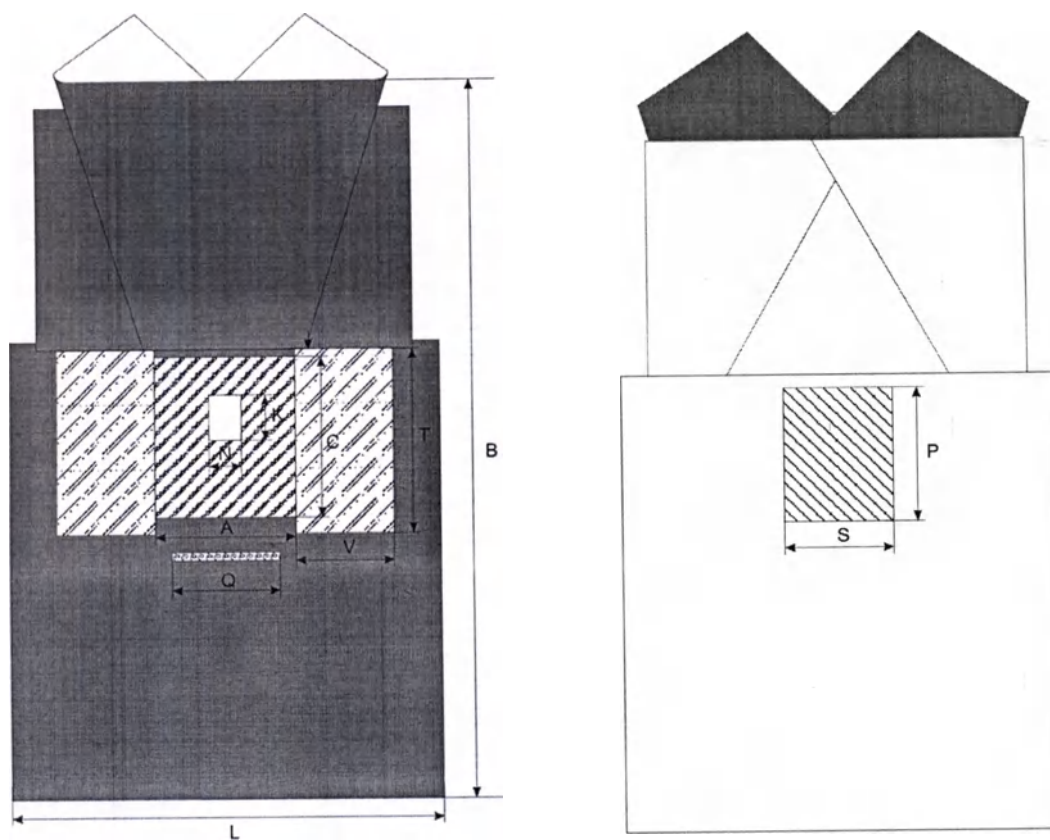


Рисунок 38. Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной). Обозначение «Барьер 9398.001.44».

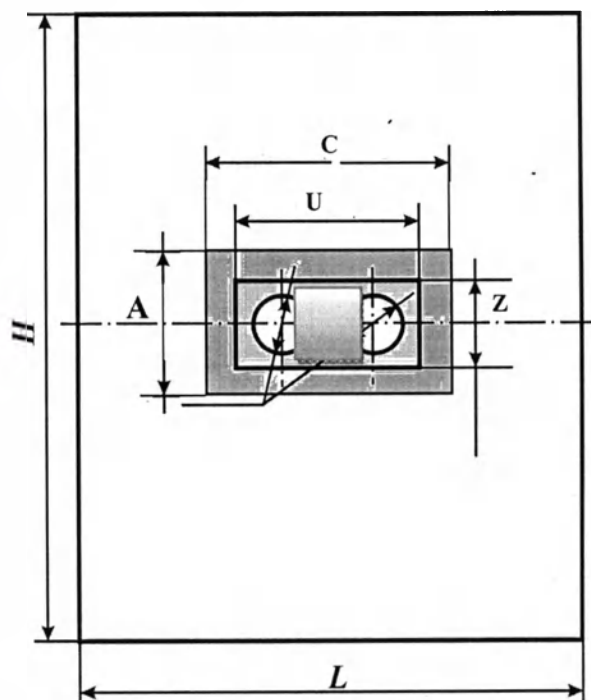
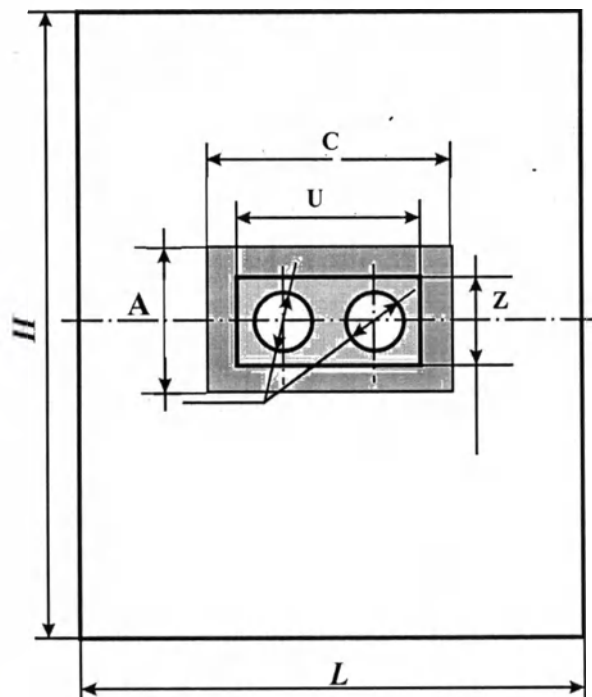


Рисунок 39. Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой. Обозначение «Барьер 9398.001.45».

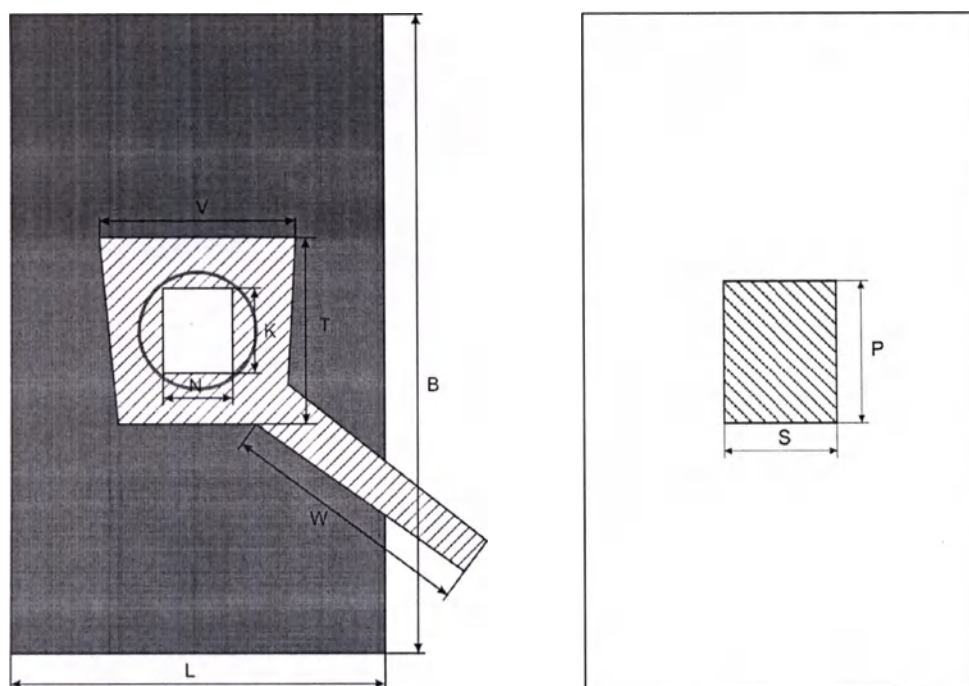


Рисунок 40. Пеленка хирургическая с адгезивным слоем. Обозначение «Барьер 9398.001.46».

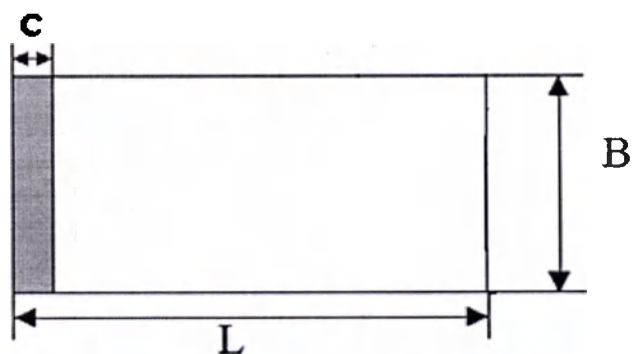


Рисунок 41. Маска медицинская.


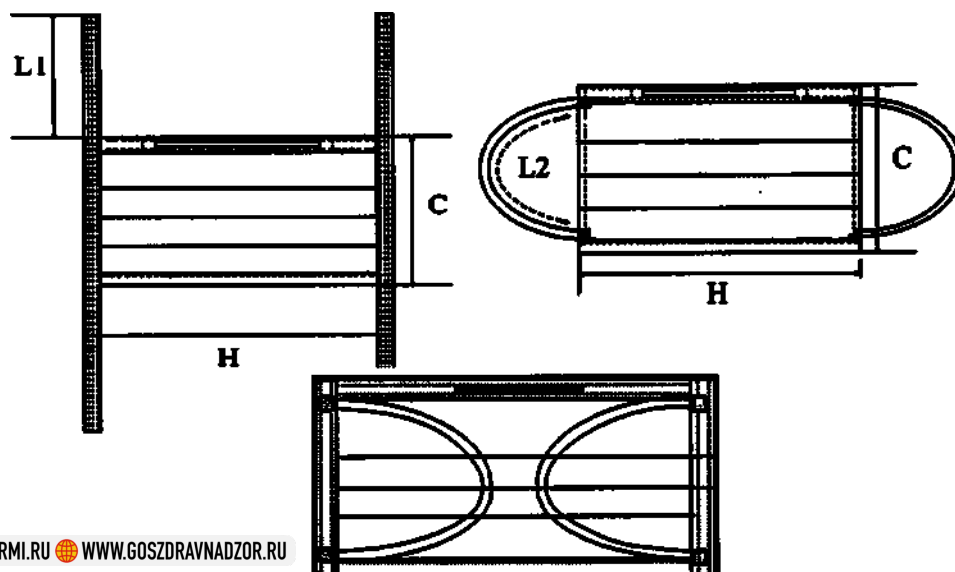


Рисунок 42. Гинекологическая прокладка

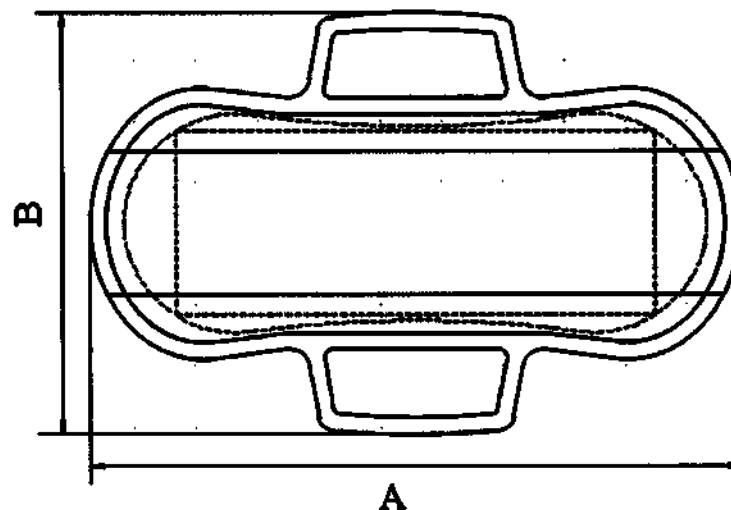

17.5. Основные линейные размеры изделий должны соответствовать обозначению «Барьер 9398.001.XX» и требованиям, представленным в таблицах 1 – 48.

Таблица 1 (к рисунку 1).

Халат хирургический (с усиленной защитной зоной, т.е. - ламинированы перед халата и рукава, или без нее).
Обозначение «Барьер 9398.001.01».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина защитной зоны (D), см (при наличии)	Длина рукава (С), см	Длина защитной зоны рукава (G), см (при наличии)	Ширина рукава внизу (К), см	Длина завязок (F), см
40-46	110,0±10,0	60,0±5,0	95,0±10,0	62,0±5,0	42,0±4,0	18,0±2,0	не менее 60,0
48-54	130,0±10,0	68,0±5,0	115,0±10,0				
56-62		76,0±5,0					
64-70		84,0±5,0					

Таблица 2 (к рисунку 2).

Куртка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.02».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина рукава (С), см		Ширина рукава внизу (К), см
			длинного	короткого	
40-46	80,0±5,0	60,0±5,0	62,0±5,0	30,0±3,0	18,0±2,0
48-54		68,0±5,0			
56-62		76,0±5,0			
64-70		84,0±5,0			

Таблица 3 (к рисунку 3).

Брюки хирургические. Обозначение «Барьер 9398.001.03».

Размер	Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина шагового шва (L), см	Ширина брюк внизу (Н), см
40-46	110,0±10,0	50,0±5,0	85,0±5,0	30,0±3,0
48-54		58,0±5,0		
56-62		66,0±5,0		
64-70		74,0±5,0		

Таблица 4 (к рисунку 4).

Комбинезон. Обозначение «Барьер 9398.001.04».

Длина изделия (от шеи до голеностопного сустава) (Н1), см	180,0 ± 10,0
Длина переда от середины горловины до промежности (Н 2), см	85,0 ± 5,0
Длина по шаговому шву (Н 3), см	85,0 ± 5,0
Ширина переда на уровне глубины проймы (С 1), см	82,0 ± 5,0
Ширина спинки (С 2), см	84,0 ± 5,0
Ширина в талии (С 3), см	82,0 ± 5,0
Ширина внизу (С 4), см	33,0 ± 3,0
Длина рукава от высокой точки оката до низа (L1), см	83,0 ± 5,0
Высота стенки капюшона (Н4), см (при наличии)	40,0 ± 4,0
Длина внутренней окружности капюшона (L2), см (при наличии)	54,0 ± 5,0

Таблица 5 (к рисунку 5).

Фартук хирургический защитный Обозначение «Барьер 9398.001.05».

Длина изделия (А), см	Ширина изделия (В), см	Длина завязок (F), см
60,0±5,0		не менее 40,0
70,0±5,0	60,0±5,0	
80,0±5,0	70,0±5,0	
90,0±5,0	80,0±5,0	
100,0±10,0	90,0±5,0	
110,0±10,0	100,0±10,0	
130,0±10,0	120,0±10,0	
150,0±10,0	140,0±10,0	
170,0±10,0		

Таблица 6 (к рисунку 6). Шапочка «Колпак». Обозначение «Барьер 9398.001.06».

Высота изделия (H), см	Длина внутренней окружности (L ₁), см	Длина завязок (L ₂), см	Диаметр доньшка (D), см
16,0±2,0	58,0±5,0	25,0 ± 0,5	20,0±2,0
20,0±2,0			
26,0±2,0			

Таблица 7 (к рисунку 7). Шапочка «Берет». Обозначение «Барьер 9398.001.07».

Высота изделия (A), см	Длина внутренней окружности (O), см	Диаметр доньшка (L), см
15,0±2,0	60,0±5,0	30,0 ± 0,5

Таблица 8 (к рисунку 8). Шапочка «Шлем». Обозначение «Барьер 9398.001.08».

Высота стенки (H), см	Длина внутренней окружности (L ₁), см	Длина завязок (L ₂), см
33,0 ± 3,0	94,0 ± 5,0	не менее 70,0

Таблица 9 (к рисунку 9). Шапочка «Шапочка для новорожденного». Обозначение «Барьер 9398.001.9».

Высота изделия (A), см	Длина завязок (F), см
12,0 ± 1,0	не менее 15,0

Таблица 10 (к рисунку 10). Бахилы хирургические низкие. Обозначение «Барьер 9398.001.10».

Высота изделия (A), см	Длина ступни (N), см
7,0±0,5	10,0±1,0
8,0±0,5	12,0±1,0
9,0±0,5	14,0±1,0
10,0±1,0	16,0±1,0
12,0±1,0	18,0±1,0
14,0±1,0	20,0±2,0
16,0±1,0	24,0±2,0
18,0±1,0	28,0±2,0
20,0±2,0	32,0±3,0
24,0±2,0	38,0±3,0
28,0±2,0	44,0±3,0
32,0±3,0	47,0±3,0

Таблица 11 (к рисунку 11).

Бахилы хирургические высокие. Обозначение «Барьер 9398.001.11».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см	Длина завязок (при наличии) (K), см
40,0±5,0	36,0±3,0	40,0±10,0
50,0±5,0		
60,0±5,0	42,0±3,0	
70,0±5,0		
80,0±5,0	47,0±3,0	
90,0±5,0		

Таблица 12 (к рисунку 12).

Чехол на конечности пациента. Обозначение «Барьер 9398.001.12».

Высота изделия (А), см	Длина ступни (N), см
50,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0
60,0 ± 5,0	
70,0 ± 5,0	
80,0 ± 5,0	
90,0 ± 5,0	
100,0 ± 10,0	
120,0 ± 10,0	
140,0 ± 10,0	

Таблица 13 (к рисунку 13).

Нарукавники. Обозначение «Барьер 9398.001.13».

Длина изделия (А), см	Ширина изделия в верхней части (K), см	Ширина изделия в области манжета (K1), см
50,0±5,0	25,0±2,0	17,0±2,0

Таблица 14 (к рисунку 14).

Рубашка для роженицы (для пациента). Обозначение «Барьер 9398.001.14».

Наименование показателя	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6	Размер 7
Длина переда от середины горловины до низа (L), см;	60,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0	80,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0	100,0 ± 10,0	120,0 ± 10,0	140,0 ± 10,0

Высота проймы рукава (Н), см;	16,0 ± 1,0	20,0 ± 1,0	25,0 ± 1,0	34,0 ± 1,0	34,0 ± 1,0	34,0 ± 1,0	34,0 ± 1,0
Ширина на уровне глубины проймы (С), см.	36,0 ± 2,0	40,0 ± 2,0	45,0 ± 2,0	72,0 ± 2,0	72,0 ± 2,0	72,0 ± 2,0	72,0 ± 2,0

Таблица 15 (к рисунку 15).

Рубашка для новорожденного. Обозначение «Барьер 9398.001.15».

Длина спинки рубашки (Н1), см	30,0 ± 1,0
Длина переда рубашки от горловины до низа (Н2), см	20,0 ± 1,0
Длина рукава рубашки от горловины (L), см	20,0 ± 0,5
Ширина переда рубашки на уровне глубины проймы (С1), см	28,0 ± 1,0
Ширина спинки распашонки (С2), см	28,0 ± 1,0
Ширина распашонки снизу (С3), см	28,0 ± 1,0

Таблица 16 (к рисунку 16).

Трусики процедурные. Обозначение «Барьер 9398.001.16».

Высота (Н), см	36,0 ± 1,0
½ длины на бедре при растянутой резинке (L1), см	52,0 ± 1,0
Длина внутренней окружности (L 2), см	79,0 ± 1,0
Длина талии при растянутой резинке (L3), см	82,0 ± 1,0

Таблица 17 (к рисунку 17).

Накидка медицинская. Обозначение «Барьер 9398.001.17».

Наименование показателя	Размеры	
Длина переда от середины горловины до низа (Н), см	140,0 ± 10,0	95,0 ± 5,0
Ширина на уровне глубины проймы (С1), см	170,0 ± 10,0	145,0 ± 10,0
Ширина внизу (С2), см	168,0 ± 10,0	143,0 ± 10,0
Длина пояса (А), см	70,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0

Таблица 18 (к рисунку 18)

Простыня хирургическая влагонепроницаемая. Обозначение «Барьер 9398.001.18».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 19 (к рисунку 19)

Тампон впитывающий. Обозначение «Барьер 9398.001.19».

Длина изделия (L), см	Ширина изделия (B), см	Диаметр изделия (D), см
3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3	-
5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	-
7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5	-
-	-	3,0 ± 0,3
-	-	5,0 ± 0,5

Таблица 20 (к рисунку 20)

Пододушечник. Обозначение «Барьер 9398.001.20».

Длина пододушечника (A), см	Ширина пододушечника (B), см	Ширина входа в пододушечник (D), см
90±5,0	50,0±5,0	30,0±3,0 50,0±5,0
100,0±10,0	60,0±5,0	
110,0±10,0	70,0±5,0	
130,0±10,0	80,0±5,0	
150,0±10,0	90,0±5,0	
170,0±10,0	100,0±10,0	
190,0±10,0	120,0±10,0	
210,0±10,0	140,0±10,0	
230,0±10,0	160,0±10,0	
250,0±10,0	180,0±10,0	

Таблица 21 (к рисунку 21) Наволочка. Обозначение «Барьер 9398.001.21».

Длина наволочки (A), см	Ширина наволочки (B), см
10,0±1,0	10,0±1,0
12,0±1,0	12,0±1,0
14,0±2,0	14,0±2,0
18,0±2,0	18,0±2,0
22,0±2,0	22,0±2,0
26,0±2,0	26,0±2,0
30,0±3,0	30,0±3,0
36,0±3,0	36,0±3,0
42,0±4,0	42,0±4,0
50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0

Таблица 22 (к рисунку 22) Наматрасник. Обозначение «Барьер 9398.001.22».

Длина наматрасника (А), см	Ширина наматрасника (В), см	Ширина стенки наматрасника (С), см
90,0±5,0	50,0±5,0	10,0±1,0 20,0±2,0 30,0±3,0 40,0±4,0 50,0±5,0
100,0±10,0	60,0±5,0	
110,0±10,0	70,0±5,0	
130,0±10,0	80,0±5,0	
150,0±10,0	90,0±5,0	
170,0±10,0	100,0±10,0	
190,0±10,0	110,0±10,0	
210,0±10,0	130,0±10,0	
	150,0±10,0	
	170,0±10,0	

Таблица 23 (к рисунку 23)

Простыня медицинская. Обозначение «Барьер 9398.001.23».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (В), см
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 24 (к рисунку 24)

Чехол на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.001.24».

Длина чехла (А), см	Ширина чехла (В), см	Длина завязок (F), см (при наличии)
50,0±5,0	50,0±5,0	не менее 30,0
60,0±5,0	60,0±5,0	
70,0±5,0	70,0±5,0	
80,0±5,0	80,0±5,0	
90,0±5,0	90,0±5,0	
100,0±10,0	100,0±10,0	
120,0±10,0	120,0±10,0	
140,0±10,0	140,0±10,0	
160,0±10,0	160,0±10,0	
180,0±10,0	180,0±10,0	

Таблица 25 (к рисунку 24) Чехол на медоборудование. Обозначение «Барьер 9398.001.25».

Длина чехла (А), см	Ширина чехла (В), см	Длина завязок (F), см
8,0±2,0	8,0±2,0	не менее 30,0
12,0±2,0	12,0±2,0	
18,0±2,0	18,0±2,0	
22,0±2,0	22,0±2,0	
26,0±2,0	26,0±2,0	
30,0±3,0	30,0±3,0	
36,0±3,0	36,0±3,0	
42,0±4,0	42,0±4,0	
50,0±5,0	50,0±5,0	
60,0±5,0	60,0±5,0	
70,0±5,0	70,0±5,0	
80,0±5,0	80,0±5,0	
90,0±5,0	90,0±5,0	
100,0±10,0	100,0±10,0	
120,0±10,0	120,0±10,0	
140,0±10,0	140,0±10,0	
160,0±10,0	160,0±10,0	
180,0±10,0	180,0±10,0	
200,0±10,0	200,0±10,0	
220,0±10,0	220,0±10,0	
240,0±10,0	240,0±10,0	
260,0±10,0	260,0±10,0	
280,0±10,0	280,0±10,0	

Таблица 26 (к рисунку 25)

Операционная липкая лента. Обозначение «Барьер 9398.001.26».

Длина ленты (L), см	Ширина ленты (В), см
30,0±3,0	3,0±0,3
35,0±3,0	4,0±0,3
42,0±4,0	5,0±0,5
50,0±5,0	6,0±0,5
60,0±5,0	
70,0±5,0	7,0±0,5
80,0±5,0	8,0±0,5
90,0±5,0	9,0±0,5
	10,0±1,0

Таблица 27 (к рисунку 26)

Держатель для шнура. Обозначение «Барьер 9398.001.27».

Длина кармана -	30,0 ± 3,0
Ширина держателя (В), см	3,0 ± 0,3
Длина липкого слоя (L), см	30,0 ± 3,0
Ширина липкого слоя (А), см	3,0 ± 0,3

Таблица 28 (к рисунку 27)

Карман-приемник. Обозначение «Барьер 9398.001.28».

Длина кармана (А), см	Ширина кармана внизу (В), см	Ширина кармана вверху (С), см
20,0±5,0	20,0±5,0	10,0±5,0
30,0±5,0	30,0±5,0	20,0±5,0
40,0±5,0	40,0±5,0	30,0±5,0
50,0±5,0	50,0±5,0	40,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0	50,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0	60,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0	70,0±5,0
90,0±5,0		
100,0±10,0		

Таблица 29 (к рисунку 28)

Мешок медицинский защитный. Обозначение «Барьер 9398.001.29».

Длина мешка (А), см	Ширина мешка (В), см
50,0±5,0	30,0±3,0
70,0±5,0	50,0±5,0
90,0±5,0	70,0±5,0
110,0±10,0	90,0±5,0
130,0±10,0	110,0±10,0
150,0±10,0	130,0±10,0
170,0±10,0	150,0±10,0
190,0±10,0	110,0±10,0
210,0±10,0	130,0±10,0
230,0±10,0	150,0±10,0
250,0±10,0	170,0±10,0

Таблица 30 (к рисунку 29)

Конверт для новорожденного Обозначение «Барьер 9398.001.30».

Наименование показателя	Размеры			
	1	2	3	4
Длина изделия (L), см	70,0 ± 5,0	40,0 ± 2,0	55,0± 5,0	55,0± 5,0
Ширина изделия (В), см	40,0 ± 5,0	30,0 ± 2,0	32,0± 2,0	40,0 ± 5,0
Высота изделия (Н), см	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5

Таблица 31 (к рисунку 30). Салфетка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.31»

Длина салфетки (L), см	Ширина салфетки (B), см
3,3±0,3	3,3±0,3
3,9±0,3	3,9±0,3
4,6±0,4	4,6±0,4
5,0±0,5	5,0±0,5
6,0±0,5	6,0±0,5
7,0±0,5	7,0±0,5
8,0±0,5	8,0±0,5
9,0±0,5	9,0±0,5
10,0±1,0	10,0±1,0
12,0±1,0	12,0±1,0
14,0±1,0	14,0±1,0
16,0±1,0	16,0±1,0
18,0±1,0	18,0±1,0
20,0±2,0	20,0±2,0
24,0±2,0	24,0±2,0
28,0±2,0	28,0±2,0
33,0±3,0	33,0±3,0
39,0±3,0	39,0±3,0
46,0±4,0	46,0±4,0
55,0±5,0	55,0±5,0
65,0±5,0	65,0±5,0
75,0±5,0	75,0±5,0
85,0±5,0	85,0±5,0

Таблица 32 (к рисунку 30).

Покрывало на оборудование. Обозначение «Барьер 9398.001.32»

Наименование показателя	Размеры		
Длина покрывала (L), см	320,0 ± 10,0	180 ± 10,0	210,0 ± 10,0
Ширина покрывала (B), см	200,0 ± 10,0	100,0 ± 10,0	140,0 ± 10,0

Таблица 33 (к рисунку 30).

Пеленка хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.33 ».

Наименование показателя	Размеры			
Длина пеленки (L), см	60,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0	60,0 ± 5,0	180,0 ± 10,0
Ширина пеленки (B), см	60,0 ± 5,0	60,0 ± 5,0	40,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0

Таблица 34 (к рисунку 30).

Простыня хирургическая. Обозначение «Барьер 9398.001.34».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 35 (к рисунку 30).

Простыня на инструментальный столик. Обозначение «Барьер 9398.001.35».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0

Таблица 36 (к рисунку 30).

Покрывало хирургическое (на оборудование). Обозначение «Барьер 9398.001.36»

Длина покрытия (L), см	Ширина покрытия (B), см
70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0
110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0
150,0±10,0	150,0±10,0
170,0±10,0	170,0±10,0
190,0±10,0	190,0±10,0
210,0±10,0	210,0±10,0
230,0±10,0	230,0±10,0
250,0±10,0	250,0±10,0
270,0±10,0	270,0±10,0
290,0±10,0	
310,0±10,0	
330,0±10,0	

Таблица 37 (к рисунку 31). Простыня влагонепроницаемая с карманом. Обозначение «Барьер 9398.001.37».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Длина кармана (T), см	Ширина кармана (V), см	Ширина адгезивного края (F), см
110,0±10,0	70,0±5,0	20,0±2,0	70,0±5,0	3,0±0,3
130,0±10,0	80,0±5,0	30,0±3,0	80,0±5,0	4,0±0,3
		40,0±5,0		5,0±0,5
		50,0±5,0		6,0±0,5

Таблица 38 (к рисунку 32). Повязка защитная. Обозначение «Барьер 9398.001.38»

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4	Размер 5	Размер 6
Длина повязки (L), см	10,0 ± 1,0	7,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	10,0 ± 1,0	15,0 ± 1,0	15,0 ± 1,0
Ширина повязки (B), см	30,0 ± 3,0	10,0 ± 1,0	7,0 ± 0,5	15,0 ± 1,0	30,0 ± 3,0	20,0 ± 2,0
Длина впитывающей зоны (A), см	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	2,8 ± 0,2	3,8 ± 0,2	8,0 ± 0,5	5,0 ± 0,2
Ширина впитывающей зоны (C), см	25,0 ± 2,0	8,0 ± 0,5	3,8 ± 0,2	10,0 ± 0,2	25,0 ± 0,2	15,0 ± 0,2

Таблица 39 (к рисунку 33).

Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной).

Обозначение «Барьер 9398.001.39».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Длина впитывающей зоны (E), см	Ширина впитывающей зоны (D), см	Ширина адгезивного слоя (C), см
50,0±5,0	50,0±5,0	40,0±5,0	40,0±5,0	3,0±0,3
60,0±5,0	60,0±5,0	50,0±5,0	50,0±5,0	4,0±0,3
70,0±5,0	70,0±5,0	60,0±5,0	60,0±5,0	5,0±0,5
80,0±5,0	80,0±5,0	70,0±5,0	70,0±5,0	6,0±0,5
90,0±5,0	90,0±5,0	80,0±5,0	80,0±5,0	
100,0±10,0	100,0±10,0	90,0±5,0	90,0±5,0	
110,0±10,0	110,0±10,0	100,0±10,0	100,0±10,0	
130,0±10,0	130,0±10,0	110,0±10,0	110,0±10,0	
150,0±10,0	150,0±10,0			
170,0±10,0	170,0±10,0			
190,0±10,0	190,0±10,0			
210,0±10,0	210,0±10,0			
230,0±10,0	230,0±10,0			
250,0±10,0	250,0±10,0			
270,0±10,0	270,0±10,0			
290,0±10,0	290,0±10,0			
310,0±10,0	310,0±10,0			
330,0±10,0	330,0±10,0			
350,0±10,0	350,0±10,0			
370,0±10,0				

Таблица 40 (к рисунку 34).

Простыня с отверстием, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной).

Обозначение «Барьер 9398.001.40»

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Длина отверстия (F2), см	Ширина отверстия (F1), см	Длина операционной пленки (A2), см	Ширина операционной пленки (A1), см
60,0±5,0	60,0±5,0	3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0
70,0±5,0	70,0±5,0	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	11,0 ± 1,0	11,0 ± 1,0
80,0±5,0	80,0±5,0	7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5	13,0 ± 1,0	13,0 ± 1,0
90,0±5,0	90,0±5,0	8,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	15,0 ± 1,0	15,0 ± 1,0
100,0±10,0	100,0±10,0	9,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5	17,0 ± 1,0	17,0 ± 1,0
110,0±10,0	110,0±10,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0
130,0±10,0	130,0±10,0	12,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	21,0 ± 2,0	21,0 ± 2,0
150,0±10,0	150,0±10,0	14,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	23,0 ± 2,0	23,0 ± 2,0
170,0±10,0	170,0±10,0	16,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0	25,0 ± 2,0	25,0 ± 2,0
190,0±10,0	190,0±10,0	18,0 ± 1,0	18,0 ± 1,0	29,0 ± 2,0	29,0 ± 2,0
210,0±10,0	210,0±10,0	20,0 ± 2,0	20,0 ± 2,0	33,0 ± 3,0	33,0 ± 3,0
230,0±10,0	230,0±10,0	24,0 ± 2,0	24,0 ± 2,0	40,0 ± 4,0	40,0 ± 4,0
250,0±10,0	250,0±10,0	28,0 ± 2,0	28,0 ± 2,0	50,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0
270,0±10,0	270,0±10,0	32,0 ± 3,0	32,0 ± 3,0	60,0 ± 6,0	
290,0±10,0	290,0±10,0	40,0 ± 4,0	40,0 ± 4,0		
310,0±10,0	310,0±10,0	50,0 ± 5,0			
330,0±10,0	330,0±10,0				
350,0±10,0	350,0±10,0				
370,0±10,0					
390,0±10,0					

Продолжение Таблицы 40 (к рисунку 34).

Длина впитывающей зоны (Е), см	Ширина впитывающей зоны (D), см	Ширина адгезивного слоя, см
70,0 ± 7,0	50,0 ± 5,0	3,0±0,3 4,0±0,3
100,0 ± 10,0	50,0 ± 7,0	5,0±0,5 6,0±0,5
100,0 ± 10,0	70,0 ± 7,0	
100,0 ± 10,0	100,0 ± 10,0	

Таблица 41 (к рисунку 35).

Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной).

Обозначение «Барьер 9398.001.41 ».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Длина отверстия (K), см	Ширина отверстия (N), см	Длина операционной пленки (P), см	Ширина операционной пленки (S), см
210,0±10,0	210,0±10,0	10,0 ± 1,0	7,0 ± 0,5	15,0 ± 1,0	11,0 ± 1,0
230,0±10,0	230,0±10,0	12,0 ± 1,0	8,0 ± 0,5	17,0 ± 1,0	13,0 ± 1,0
250,0±10,0	250,0±10,0	14,0 ± 1,0	9,0 ± 0,5	19,0 ± 1,0	15,0 ± 1,0
270,0±10,0	270,0±10,0	16,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	21,0 ± 2,0	17,0 ± 1,0
290,0±10,0	290,0±10,0	18,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	23,0 ± 2,0	19,0 ± 1,0
310,0±10,0	310,0±10,0	20,0 ± 2,0	14,0 ± 1,0	25,0 ± 2,0	21,0 ± 2,0
330,0±10,0	330,0±10,0	24,0 ± 2,0	16,0 ± 1,0	29,0 ± 2,0	23,0 ± 2,0
350,0±10,0	350,0±10,0	28,0 ± 2,0	18,0 ± 1,0	33,0 ± 3,0	25,0 ± 2,0
370,0±10,0	370,0±10,0	32,0 ± 3,0	20,0 ± 2,0	40,0 ± 4,0	29,0 ± 2,0
390,0±10,0	390,0±10,0		24,0 ± 2,0		33,0 ± 3,0

Продолжение Таблицы 41 (к рисунку 35).

Длина встроенных покрытий для ног (R), см	Ширина адгезивного слоя, см	Длина впитывающей зоны (Е), см	Ширина впитывающей зоны (D), см
50,0±5,0	3,0±0,3 4,0±0,3	100,0 ± 10,0	50,0 ± 5,0
70,0±5,0	5,0±0,5 6,0±0,5	100,0 ± 10,0	70,0 ± 7,0
90,0±5,0 110,0±10,0 130,0±10,0		100,0 ± 10,0	100,0 ± 10,0

Таблица 42 (к рисунку 36).

Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной). Обозначение «Барьер 9398.001.42».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Ширина адгезивного слоя (C), см	Длина впитывающей зоны (Е), см	Ширина впитывающей зоны (D), см
30,0±5,0	30,0±5,0			
40,0±5,0	40,0±5,0	3,0±0,3	40,0±5,0	40,0±5,0
50,0±5,0	50,0±5,0	4,0±0,3	50,0±5,0	50,0±5,0
60,0±5,0	60,0±5,0	5,0±0,5	60,0±5,0	60,0±5,0
70,0±5,0	70,0±5,0	6,0±0,5	70,0±5,0	70,0±5,0
80,0±5,0	80,0±5,0		80,0±5,0	80,0±5,0
90,0±5,0	90,0±5,0		90,0±5,0	90,0±5,0
100,0±10,0	100,0±10,0		100,0±10,0	100,0±10,0
110,0±10,0	110,0±10,0		110,0±10,0	110,0±10,0
130,0±10,0	130,0±10,0			

150,0±10,0	150,0±10,0			
170,0±10,0	170,0±10,0			
190,0±10,0	190,0±10,0			
210,0±10,0	210,0±10,0			
230,0±10,0	230,0±10,0			
250,0±10,0	250,0±10,0			
270,0±10,0	270,0±10,0			
290,0±10,0	290,0±10,0			
310,0±10,0	310,0±10,0			
330,0±10,0	330,0±10,0			
350,0±10,0	350,0±10,0			
370,0±10,0				
390,0±10,0				

Продолжение Таблицы 42 (к рисунку 36).

Длина отверстия (A2), см	Ширина отверстия (A1), см
3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3
5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5
7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5
8,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5
9,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5
10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0
12,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0
14,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0
16,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0
18,0 ± 1,0	18,0 ± 1,0
20,0 ± 2,0	20,0 ± 2,0
24,0 ± 2,0	24,0 ± 2,0
28,0 ± 2,0	28,0 ± 2,0
32,0 ± 3,0	32,0 ± 3,0
40,0 ± 4,0	40,0 ± 4,0
50,0 ± 5,0	

Таблица 43 (к рисунку 37).

Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой, (может быть с впитывающей зоной).

Обозначение «Барьер 9398.001.43».

Длина простыни (B), см	Ширина простыни (L), см	Длина отверстия (K), см	Ширина отверстия (N), см	Ширина адгезивного слоя, см
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

50,0±5,0	50,0±5,0	3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3	3,0±0,3
60,0±5,0	60,0±5,0	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	4,0±0,3
70,0±5,0	70,0±5,0	7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5	5,0±0,5
80,0±5,0	80,0±5,0	8,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5	6,0±0,5
90,0±5,0	90,0±5,0	9,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5	
100,0±10,0	100,0±10,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	
110,0±10,0	110,0±10,0	12,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0	
130,0±10,0	130,0±10,0	14,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0	
150,0±10,0	150,0±10,0	16,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0	
170,0±10,0	170,0±10,0	18,0 ± 1,0	18,0 ± 1,0	
190,0±10,0	190,0±10,0	20,0 ± 2,0	20,0 ± 2,0	
210,0±10,0	210,0±10,0	24,0 ± 2,0	24,0 ± 2,0	
230,0±10,0	230,0±10,0	28,0 ± 2,0	28,0 ± 2,0	
250,0±10,0	250,0±10,0	32,0 ± 3,0	32,0 ± 3,0	
270,0±10,0	270,0±10,0	40,0± 4,0	40,0± 4,0	
290,0±10,0	290,0±10,0	50,0± 5,0		
310,0±10,0	310,0±10,0			
330,0±10,0	330,0±10,0			
350,0±10,0	350,0±10,0			
370,0±10,0				
390,0±10,0				

Продолжение таблицы 43 (к рисунку 37)

Длина операционной пленки (P), см	Ширина операционной пленки (S), см	Длина кармана (Т), см	Ширина кармана (V), см
10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	20,0±2,0	20,0±2,0
11,0 ± 1,0	11,0 ± 1,0	30,0±3,0	30,0±3,0
13,0 ± 1,0	13,0 ± 1,0	40,0±5,0	40,0±5,0
15,0 ± 1,0	15,0 ± 1,0	50,0±5,0	50,0±5,0
17,0 ± 1,0	17,0 ± 1,0	60,0±5,0	60,0±5,0
19,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0	70,0±5,0	70,0±5,0
21,0 ± 2,0	21,0 ± 2,0	80,0±5,0	80,0±5,0
23,0 ± 2,0	23,0 ± 2,0	90,0±5,0	90,0±5,0
25,0 ± 2,0	25,0 ± 2,0		
29,0 ± 2,0	29,0 ± 2,0		
33,0 ± 3,0	33,0 ± 3,0		
40,0 ± 4,0	40,0 ± 4,0		
50,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0		
60,0± 6,0			

Таблица 44 (к рисунку 38).

Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной). Обозначение «Барьер 9398.001.44».

Длина простыни (H), см	Ширина простыни (L), см	Длина впитывающей зоны (A), см	Ширина впитывающей зоны (C), см	Ширина адгезивного слоя, см
50,0±5,0	50,0±5,0	40,0±5,0	40,0±5,0	3,0±0,3
60,0±5,0	60,0±5,0	50,0±5,0	50,0±5,0	4,0±0,3
70,0±5,0	70,0±5,0	60,0±5,0	60,0±5,0	5,0±0,5
80,0±5,0	80,0±5,0	70,0±5,0	70,0±5,0	6,0±0,5
90,0±5,0	90,0±5,0	80,0±5,0	80,0±5,0	
100,0±10,0	100,0±10,0	90,0±5,0	90,0±5,0	
110,0±10,0	110,0±10,0	100,0±5,0	100,0±5,0	
130,0±10,0	130,0±10,0	110,0±5,0	110,0±5,0	
150,0±10,0	150,0±10,0			
170,0±10,0	170,0±10,0			
190,0±10,0	190,0±10,0			
210,0±10,0	210,0±10,0			
230,0±10,0	230,0±10,0			
250,0±10,0	250,0±10,0			
270,0±10,0	270,0±10,0			
290,0±10,0	290,0±10,0			
310,0±10,0	310,0±10,0			
330,0±10,0	330,0±10,0			
350,0±10,0	350,0±10,0			
370,0±10,0				
390,0±10,0				
410,0±10,0				
430,0±10,0				
450,0±10,0				

Продолжение Таблицы 44 (к рисунку 38)

Длина операционной пленки (Z), см	Ширина операционной пленки (U), см	Длина или ширина или диаметр отверстия отверстий, мм
6,0 ± 0,5	15,0 ± 1,0	2,0±0,2
11,0 ± 1,0	17,0 ± 1,0	3,0±0,3
13,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0	5,0±0,5
15,0 ± 1,0	21,0 ± 2,0	7,0±0,5
17,0 ± 1,0	23,0 ± 2,0	10,0±1,0
19,0 ± 1,0	25,0 ± 2,0	12,0±1,0
21,0 ± 2,0	29,0 ± 2,0	15,0±1,0
23,0 ± 2,0	33,0 ± 3,0	
25,0 ± 2,0	40,0 ± 4,0	
	50,0 ± 5,0	

Таблица 45 (к рисунку 39).

Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой.
Обозначение «Барьер 9398.001.45».

Длина простыни (L), см	Ширина простыни (B), см	Длина отверстия (K), см	Ширина отверстия (N), см
60,0±5,0	60,0±5,0	3,0 ± 0,3	3,0 ± 0,3
70,0±5,0	70,0±5,0	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5
80,0±5,0	80,0±5,0	7,0 ± 0,5	7,0 ± 0,5
90,0±5,0	90,0±5,0	8,0 ± 0,5	8,0 ± 0,5
100,0±10,0	100,0±10,0	9,0 ± 0,5	9,0 ± 0,5
110,0±10,0	110,0±10,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0
130,0±10,0	130,0±10,0	12,0 ± 1,0	12,0 ± 1,0
150,0±10,0	150,0±10,0	14,0 ± 1,0	14,0 ± 1,0
170,0±10,0	170,0±10,0	16,0 ± 1,0	16,0 ± 1,0
190,0±10,0	190,0±10,0	18,0 ± 1,0	18,0 ± 1,0
210,0±10,0	210,0±10,0	20,0 ± 2,0	20,0 ± 2,0
230,0±10,0	230,0±10,0	24,0 ± 2,0	24,0 ± 2,0
250,0±10,0	250,0±10,0	28,0 ± 2,0	28,0 ± 2,0
270,0±10,0	270,0±10,0	32,0 ± 3,0	32,0 ± 3,0
290,0±10,0	290,0±10,0	40,0± 4,0	40,0± 4,0
310,0±10,0	310,0±10,0	50,0± 5,0	
330,0±10,0	330,0±10,0		
350,0±10,0	350,0±10,0		
370,0±10,0			
390,0±10,0			

Продолжение таблицы 45 (к рисунку 39)

Длина операционной пленки (P), см	Ширина операционной пленки (S), см	Длина кармана (T), см	Ширина кармана (V), см	Длина отвода (W), см
10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	20,0±2,0	20,0±2,0	50,0±5,0
11,0 ± 1,0	11,0 ± 1,0	30,0±3,0	30,0±3,0	70,0±5,0
13,0 ± 1,0	13,0 ± 1,0	40,0±5,0	40,0±5,0	90,0±5,0
15,0 ± 1,0	15,0 ± 1,0	50,0±5,0	50,0±5,0	110,0±10,0
17,0 ± 1,0	17,0 ± 1,0	60,0±5,0	60,0±5,0	130,0±10,0
19,0 ± 1,0	19,0 ± 1,0	70,0±5,0	70,0±5,0	150,0±10,0
21,0 ± 2,0	21,0 ± 2,0	80,0±5,0	80,0±5,0	
23,0 ± 2,0	23,0 ± 2,0	90,0±5,0	90,0±5,0	
25,0 ± 2,0	25,0 ± 2,0			
29,0 ± 2,0	29,0 ± 2,0			
33,0 ± 3,0	33,0 ± 3,0			
40,0 ± 4,0	40,0 ± 4,0			
50,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0			
60,0 ± 6,0				

Продолжение таблицы 45 (к рисунку 39)

Длина адгезивного края (D), см	Ширина адгезивного слоя (F), см
50,0±5,0	
70,0±5,0	
90,0±5,0	
110,0±10,0	3,0±0,3
130,0±10,0	4,0±0,3
150,0±10,0	5,0±0,5
170,0±10,0	6,0±0,5
190,0±10,0	

Таблица 46 (к рисунку 40).

Пеленка хирургическая с адгезивным слоем. Обозначение «Барьер 9398.001.46».

Наименование показателя	Размеры			
Длина пеленки (L), см	50,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0	90,0 ± 5,0
Ширина пеленки (B), см	50,0 ± 5,0	50,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0	70,0 ± 5,0
Ширина адгезивного слоя, см	3,0±0,3 4,0±0,3 5,0±0,5 6,0±0,5			

Таблица 47 (к рисунку 41)

Маска медицинская.

Длина маски (H), см	17,5 ± 1,5;
Ширина маски (C), см	9,5 ± 0,5
Длина завязок (при наличии) (L 1), см	42,0 ± 4,0
Длина резинок в растянутом состоянии (L 2), см (при наличии)	не менее 30,0

Таблица 48 (к рисунку 42).

Гинекологическая прокладка.

Длина изделия (A), см	Ширина изделия (B), см
21,5 ± 2,0	8,0 ± 0,5
23,5 ± 2,0	15,5 ± 0,5
27,0 ± 2,0	
30,0 ± 2,0	

17.6. Комплекты и отдельные изделия должны изготавливаться из материалов, представленных в таблице 49.

Таблица 49.

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	2
1. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность 20 ± 5 г/м ²	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия ТУ 2282-001-72716572-2013	Шапочка («Колпак», «Шапочка для новорожденного»); Бахилы хирургические (высокие, низкие); Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Накидка медицинская; Простыня медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Брюки хирургические; Трусики процедурные; Куртка хирургическая
2. СМС (полимерное нетканое полотно типа «спан-мельт-спан»), плотность 50 ± 10 г/м ²	ЗАО «Регент Нетканые Материалы», Россия ТУ 2282-001-72716572-2013	Халат хирургический без усиленной защитной зоны; Фартук хирургический защитный; Шапочка («Колпак», «Шлем», «Берет»); Бахилы хирургические (высокие, низкие); Рубашка для роженицы (для пациента); Чехол на конечности пациента; Куртка хирургическая; Накидка медицинская; Простыня медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Карман-приемник; Покрывало на оборудование; Простыня на инструментальный столик; Покрывало хирургическое (на оборудование) Комбинезон;

		Салфетка хирургическая; Пеленка хирургическая; Простыня хирургическая Нарукавники; Трусики процедурные; Брюки хирургические; Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Повязка защитная; Конверт для новорожденного Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной); Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной)
3. Ламинированный Спанбонд (материал нетканый), $50 \pm 10 \text{ г/м}^2$	ООО «КЗНМ», Россия ТУ 8390-002-71242729-2005	Комбинезон; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на конечности пациента; Нарукавники; Наматрачник; Чехол на медоборудование
4. Ламинированный Спанбонд (материал нетканый), $50 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Фартук хирургический защитный; Простыня хирургическая влагонепроницаемая; Чехол на инструментальный столик; Мешок медицинский защитный; Простыня на инструментальный столик; Покрытие хирургическое (на

		оборудование); Покрывало на оборудование; Карман-приемник
5. Спанлейс (материал нетканый) плотность 40 ± 5 г/м²	ООО «Авангард», Россия ТУ 8390-003-56176857-2007	Куртка хирургическая; Брюки хирургические; Шапочка («Колпак», «Берет», «Шапочка для новорожденного»), Рубашка для роженицы (для пациента); Рубашка для новорожденного; Пододеяльник; Наволочка; Простыня на инструментальный столик; Простыня медицинская. Тампон впитывающий; Простыня хирургическая; Салфетка хирургическая; Пеленка хирургическая. Впитывающая зона: для простыней с впитывающей зоной
6. Вуденпалп (материал нетканый), плотность 65 ± 10 г/м²	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Шапочка («Колпак», «Шлем»); Бахилы хирургические (высокие, низкие); Рубашка для роженицы (для пациента); Простыня медицинская; Пододеяльник; Наволочка; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Покрывало на оборудование; Простыня на инструментальный столик; Покрывало хирургическое (на оборудование); Халат хирургический без усиленной защитной зоны; Комбинезон; Куртка хирургическая.

7. Ламинированный спанлейс (материал нетканый), плотность $65 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат хирургический с усиленной защитной зоной; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Покрывало на оборудование; Простыня на инструментальный столик; Покрытие хирургическое (на оборудование) Пеленка хирургическая; Салфетка хирургическая; Простыня хирургическая влагонепроницаемая; Простыня влагонепроницаемая с карманом
8. «Сантейс» (материал нетканый) плотность $65 \pm 10 \text{ г/м}^2$	Фирма «Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co., Ltd», Китай	Халат хирургический с усиленной защитной зоной; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Покрывало на оборудование; Простыня на инструментальный столик; Покрытие хирургическое (на оборудование) Пеленка хирургическая с адгезивным слоем; Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Операционная липкая лента; Держатель для шнура;

		Карман-приемник Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой. Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной); Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной);
9. Полотно трикотажное из хлопчатобумажной пряжи (100%)	Фирма «UNVER TEXTIL KONFEKSIYON IMALAT SANAFI VE TICARET LIMITED» Турция	Фиксирующий элемент – (манжет): Халата хирургический без усиленной защитной зоны; Халата хирургического (с усиленной защитной зоной или без нее); Комбинезона; Куртки хирургической
10. Застежка текстильная «Контакт» (100%полиамидная, тканное переплетение)	Фирма «Zhejiang Jianli Sticky Ribbon Co. Ltd», Китай.	Фиксирующий элемент (застежка для ворота): Халата хирургический без усиленной защитной зоны; Халата хирургического с усиленной защитной зоной ; Комбинезона; Куртки хирургической
11. Фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка))	ООО «ФИ-ТЕКС» Россия по ТУ 8151-001-59722763-2004	Халат хирургический без усиленной защитной зоны; Нарукавники; Комбинезон; Чехол на конечности пациента; Трусики процедурные;

		Шапочка «Берет»; Брюки хирургические; Бахилы хирургические (высокие, низкие); Куртка хирургическая Нарукавники; Наматрачник; Чехол на медоборудование.
12. Бинт липкий на полотне нетканом «БИНТЛИ» (основа – полотно нетканое, клеевой слой-акриловая эмульсия, защитное покрытие-бумага антиадгезивная)	ООО «Группа Компания Пальма» Россия по ТУ 9393-004-83228278-2012	Адгезивный слой по краю операционного поля для фиксации: Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Повязка защитная; Пеленка хирургическая с адгезивным слоем; Операционная липкая лента; Держатель для шнура; Карман-приемник Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой. Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной); Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной).
13. Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА». (основа-	ООО «Группа Компания Пальма», Россия,	В области операционного поля: Простыня с отверстием, адгезивным

пленка полиуретановая наполиэтиленовой подложке, клеевой слой- акриловая эмульсия, защитное покрытие-бумага антиадгезионная)	по ТУ 9398-005-83228278-2013.	слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой; Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной); Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной).
14. Пленка полиэтиленовая плотность 70±10г/м ²	ООО «Производственное предприятие «МС-Полимер» Россия по ГОСТ 10354	Карман, отвод: Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой.
15. Синтепон (полотно нетканое термоскрепленное, из полиэфирных волокон (100%))	ООО «Сибирский синтепон», Россия ТУ 8391-001-14765083-2003	Внутренний слой: Конверт для новорожденного

Покупные изделия, должны соответствовать указанным в таблице 50.

Таблица 50.

Наименование покупных изделий.	Нормативный документ и предприятие - изготовитель	Наименование изделий комплектов
1	2	3
1. Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matorat», стерильные в наборах и отдельных упаковках: маски;	ТЗМО С.А., Польша РУ №ФСЗ 2011/09976 (состав: спанбонд (100% полипропилен); мелтблаун (100% полипропилен); спанбонд (100% полипропилен; фиксирующая резинка (состав: латекс (нить), 100% хлопок (оплетка)); фиксатор (непластифицированный ПВХ)	Маска медицинская

2. Медицинские изделия и инструменты для хирургических вмешательств Matoset под товарным знаком «matopar», стерильные в наборах и отдельных упаковках: гинекологические прокладки;	ТЗМО С.А.», Польша РУ №ФСЗ 2011/09976 (состав: покровный слой из нетканого материала (100% полипропилен), сорбционный из распушенной целлюлозы (100% хлопок), защитный пленочный, не пропускающий влагу (100% полиэтилен). У прокладок имеется фиксирующий слой с одной или несколькими клеевыми полосами на основе термоплавкого клея (на защитном слое и крылышках (при наличии)), фиксирующий слой защищен антиадгезионной бумагой.	Гинекологическая прокладка
--	--	----------------------------

17.7. Материалы для изделий, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 51.

Таблица 51.

Наименование материала.	Поверх- ностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупор- ность, мм вод. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в про- дольном напра- влении	в попе- речном напра- лении	в про- дольном напра- влении	в попе- речном напра- лении	
I	2	3	4	5	6	7
1. Неламинированный нетканый материал (Спан-мельт-спан (СМС), Спанлейс, Вуденпалп	15,0	2,0	1,5	1,8	1,2	-
	20,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-
	25,0	3,5	2,0	3,0	1,8	-
	35,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	40,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	45,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	50,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	55,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	60,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
	65,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
	70,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
	75,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
2. Ламинированный нетканый материал (Спанбонд, Спанлейс,	40,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	50,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500

Сантейс)	55,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	60,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	65,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	70,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	75,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
3. Полиэтиленовая пленка.	40,0	3,0	2,0	-	-	500,0

17.8. Масса изделий в комплектах и отдельных упаковках должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 52 - 53.

Таблица 52. Масса изделий в комплектах

№	Наименование изделия	Масса, г
1	2	3
1	Комплект белья медицинского /хирургического (универсальный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 400,0 до 3000,0
2	Комплект белья медицинского, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 200,0 до 2000,0
3	Комплект белья медицинского/хирургического для полостных операций (в том числе лапаротомии, торакотомии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 300,0 до 3000,0
4	Комплект белья медицинского/хирургического для эндоскопических манипуляций (в том числе для лапароскопии, артроскопии, гистероскопии), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 300,0 до 3000,0
5	Комплект белья медицинского/хирургического для малоинвазивных вмешательств, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 300,0 до 3000,0
6	Комплект белья медицинского/хирургического для покрытия инструментального стола (в том числе для маточного, сестринского), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 300,0 до 1500,0
7	Комплект одежды медицинской/хирургической (в том числе для операции кесарево сечения, приема родов), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 200,0 до 3000,0
8	Комплект одежды и белья медицинского для пациента (в том числе для роженицы, новорожденного), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 200,0 до 2000,0
9	Комплект белья медицинского (постельный), из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 200,0 до 2000,0
10	Комплект белья медицинского/хирургического для проведения хирургических процедур (в том числе гемодиализа), одноразовый стерильный «Барьер»	от 200,0 до 2000,0
11	Комплект белья медицинского для диагностических манипуляций, из нетканых материалов, одноразовый стерильный «Барьер»	от 200,0 до 2000,0

Таблица 53.

Масса изделий в отдельных упаковках.

№	Наименование изделия	Масса, г
1	2	3
1	Бахилы хирургические высокие	от 10,0 до 70,0
2	Бахилы хирургические низкие	от 9,0 до 27,0
3	Брюки хирургические	от 45,0 до 170,
4	Держатель для шнура	от 10,0 до 15,0
5	Карман-приемник	от 10,0 до 120,0
6	Комбинезон	от 160,0 до 300,0
7	Конверт для новорожденного	от 100,0 до 200,0
8	Куртка хирургическая	от 40,0 до 150,0
9	Мешок медицинский защитный	от 15,0 до 510,0
10	Наволочка	от 5,0 до 125,0
11	Накидка медицинская	от 40,0 до 100,0
12	Наматрачник	от 10,0 до 280,0
13	Нарукавники	от 25,0 до 50,0
14	Операционная липкая лента	от 9,0 до 20,0
15	Пеленка хирургическая с адгезивным слоем	от 20,0 до 50,0
16	Пеленка хирургическая	от 15,0 до 125,0
17	Повязка защитная	от 5,0 до 28,0
18	Пододеяльник	от 30,0 до 640,0
19	Покрывало на оборудование	от 80,0 до 500,0
20	Покрывтие хирургическое (на оборудование)	от 20,0 до 670,0
21	Простыня влагонепроницаемая с карманом	от 40,0 до 100,0
22	Простыня медицинская	от 10,0 до 550,0
23	Простыня на инструментальный столик	от 20,0 до 550,0
24	Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной)	от 35,0 до 1000,0
25	Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной)	от 25,0 до 1000,0
26	Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой	от 80,0 до 1200,0
27	Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной)	от 30,0 до 1080,0
28	Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной)	от 60,0 до 1180,0
29	Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной)	от 200,0 до 1200,0
30	Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной)	от 50,0 до 1100,0
31	Простыня хирургическая влагонепроницаемая	от 20,0 до 550,0
32	Простыня хирургическая	от 20,0 до 550,0
33	Рубашка для новорожденного	от 10,0 до 20,0
34	Рубашка для роженицы	от 40,0 до 250,0
35	Салфетка хирургическая	от 3,0 до 60,0
36	Тампон впитывающий	от 0,2 до 0,5
37	Трусики процедурные	от 10,0 до 25,0
38	Фартук хирургический защитный	от 12,1 до 200,0
39	Халат хирургический без усиленной защитной зоны	от 120,0 до 250,0
40	Халат хирургический с усиленной защитной зоной	от 150,0 до 250,0
41	Чехол на инструментальный столик	от 45,0 до 280,0
42	Чехол на конечности пациента	от 120,0 до 220,0
43	Чехол на медоборудование	от 8,0 до 750,0
44	Шапочка- «Шлем»	от 20,0 до 40,0
45	Шапочка для новорожденного	от 10,0 до 20,0
46	Шапочка «Берет»	от 15,0 до 25,0
47	Шапочка «Колпак»	от 10,0 до 25,0
48	Гинекологическая прокладка	от 14,0 до 45,0

Поглотительная способность при одностороннем и ограниченном контакте с жидкостью *впитывающих зон простыней* должна быть не менее 5 г/г.

Впитывающая способность при полном погружении *тампона впитывающего* должна быть не менее 0,5 г/шт.

Полное влагопоглощение *гинекологической прокладки* должно быть не менее 44,0 г.

Скорость впитывания *тампона впитывающего, впитывающих зон простыней и гинекологической прокладки* должна быть не более 10 с.

Обратная сорбция *гинекологической прокладки* должна быть не более 5,0 г, .

Удерживающая способность *гинекологической прокладки* должна быть не менее 39,0 г.

Сопротивление отслаиванию адгезивного слоя изделий и операционной липкой ленты от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Сорбционная емкость подушечки *повязки защитной* должна быть не менее 1 капли /см².

Время смачивания подушечки *повязки защитной* должна быть не более

17.9. Одежда и белье включает ассортимент следующих изделий:

Халат хирургический (с усиленной защитной зоной или без неё) должен быть свободного покроя. Тип рукава: втачной или реглан, длинный с вязанным трикотажным манжетом, на завязках или собранным на резинку. Тип горловины: круглый или V-образный вырез без воротника или с воротником-стойкой. Перед халата может быть на кокетке, включать складки, обеспечивающие свободу движения. Халат дополнительно может быть усилен ламинированным материалом как с внутренней стороны изделия, так и с лицевой. Горловина халата может фиксироваться на завязки или на застежку текстильную «Контакт» Халат должен фиксироваться сзади на 2-е или 4-е завязки или на пояс в области талии. Низ халата не обработан.

Куртка хирургическая должна быть с коротким или длинным рукавом, собранным на резинку или с вязанным трикотажным манжетом. Полочка может быть с накладными карманами или без них. Спинка с кокеткой или без нее. Тип горловины: круглый или прямоугольный или V-образный, с планкой или без. При разрезной передней полочке застежка на завязки или на застежку текстильную «Контакт». Низ куртки не обработан.

Брюки хирургические должны быть свободного покроя. Верх брюк собран на резинку или завязки (кулиску), возможно наличие карманов спереди или сзади. Низ брюк собран на резинку или не обработан.

Комбинезон должен быть с длинным втачным рукавом, который оканчивается манжетой трикотажной или резинкой. Перед цельнокроеный, спинка должна быть цельнокроеная. Вырез горловины должен быть округлый. Комбинезон может иметь притачанный капюшон с резинкой или кулисой по краю. При разрезной передней полочке застежка на завязки или на застежку текстильную «Контакт». Комбинезон может на уровне талии фиксироваться резинкой или завязками.

Фартук хирургический защитный должен быть фигурным, цельнокроеным, с двумя завязками на уровне талии, лямкой или завязками, фиксирующей его на шее. Края не обработаны.

Шапочка «Колпак» должна быть цилиндрической формы, с подворотом или без, состоять из стенки и донышка круглой или овальной формы, с обработанными краями или без. Шапочка фиксируется на затылке при помощи завязок, регулирующих размер колпака.

Шапочка «Берет» должна быть собрана на резинку по краю вдоль окружности. Края могут быть не обработаны.

Шапочка «Шлем» должна состоять из стенки с донышком, завязок для плотной фиксации на шее или с плечевым покрытием на завязке. Края могут быть не обработаны.

Шапочка «Шапочка для новорожденного» должна состоять из 2-х сшитых между собой частей овальной формы и фиксироваться спереди на завязки. Края могут быть не обработаны.

Бахилы хирургические высокие могут быть с одинарной или двойной ламинированной подошвой или без нее, собраны по верхнему краю на резинку или на завязки (кулиску). Могут фиксироваться на 4-е завязки или без.

Бахилы хирургические низкие должны быть собраны по верхнему краю или по центру на резинку. Края не обработаны.

Чехол на конечности пациента должен быть одношовным, собранным по верхнему краю на манжету или резинку. Края не обработаны.

Нарукавники должны быть одношовными, верх и низ собран на резинку или на завязки или низ с вязаными трикотажными манжетами. Края не обработаны.

Рубашка для роженицы (для пациента) должна быть свободного покроя, прямого или расширенного к низу силуэта, с коротким цельнокроеным рукавом или без него. Передняя часть может быть на кокетке. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: с разрезом на завязки. Края могут быть не обработаны.

Рубашка для новорожденного должна быть свободного покроя, с длинным цельнокроеным рукавом. Вырез горловины V-образный или круглый. Тип застежки: спереди или сзади рубашка может фиксироваться на завязки. Края могут быть не обработаны.

Трусики процедурные на уровне талии собраны на резинку или фиксируются при помощи завязок. Низ трусов собран на резинку или не обработан.

Накидка медицинская должна быть без воротника, с увеличенной проймой для свободного движения, без рукавов. Полочка должна быть цельнокроеной со спинкой или состоять из 2-х половинок. Может фиксироваться завязками. Низ накидки не обработан.

Пеленка хирургическая с адгезивным слоем должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Пеленка по краю имеет адгезивный (липкий) слой.

Тампон впитывающий должен быть прямоугольной, треугольной или круглой формы, изготовленный из нетканого полотна Спанлейс.

Пододульник и наволочка представляют собой сшивные изделия прямоугольной или квадратной формы. Края могут быть обработаны и не обработаны.

Наматрачник должен быть прямоугольной формы с бортиком или без, фиксироваться при помощи резинки или на завязки.

Простыня медицинская должна быть прямоугольной формы, цельнокроенная, края не обработаны.

Чехол на инструментальный столик должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

Чехол на медоборудование должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках или стягиваться на резинке.

Операционная липкая лента должна быть прямоугольной формы, цельнокроенная, края не обработаны. С одной стороны нанесен адгезивный (липкий) слой.

Держатель для шнура должен быть прямоугольной формы, цельнокроеным, края не обработаны. С одной стороны по краю нанесен адгезивный (липкий) слой.

Карман-приемник может быть квадратной, прямоугольной или трапециевидной формы, 1, 2-х, 3-х, 4-х секционный, Края не обработаны.

Мешок медицинский защитный должен быть прямоугольной формы, завязываться на завязках.

Конверт для новорожденного должен быть прямоугольной формы. Состоит из двух частей, сшитых по краям и низу, верхний край открыт. Внутренний слой из синтепона.

Салфетка хирургическая, Покрывало на оборудование, Простыня на инструментальный столик; Простыня хирургическая, Покрывало хирургическое (на оборудование), Пеленка хирургическая, Простыня хирургическая, влагонепроницаемая должны быть прямоугольной формы, цельнокроенные, края не обработаны.

Простыня влагонепроницаемая с карманом должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Простыня имеет карман.

Повязка защитная должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Имеет впитывающую зону (подушечку) с адгезивным (липким) слоем по периметру. Защищена защитным антиадгезионным покрытием

Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Простыня по краю имеет адгезивный (липкий) слой, впитывающую зону.

Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) должна быть прямоугольной формы, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни, операционную пленку, впитывающую зону.

Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) должна быть прямоугольной или Т-образной формы, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни, операционную пленку, впитывающую зону и встроенные покрытия для ног.

Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной) должна быть прямоугольной формы, цельнокроеная, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни, впитывающую зону.

Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) должна быть прямоугольной формы, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни, боковые карманы, операционную пленку, впитывающую зону.

Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной) должна быть прямоугольной формы, края не обработаны. Простыня имеет 2 отверстия, с адгезивным (липким) слоем по их краю и/или по краю простыни, операционную пленку, впитывающую зону.

Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой должна быть прямоугольной формы, края не обработаны. Простыня имеет отверстие (прямоугольное, овальное, или треугольное), с адгезивным (липким) слоем по его краю и/или по краю простыни, карман, операционную пленку и отвод.

Маска медицинская, 3-х слойная, может быть на завязках или резинках, с обработанными краями или без. Маска оснащена фиксатором.

Гинекологическая прокладка, представляет собой многослойное комбинированное изделие, включающее основные слои, такие как покровный из нетканого материала, сорбционный из распушенной целлюлозы, защитный пленочный, не пропускающий влагу. У прокладок имеется фиксирующий слой с одной или несколькими клеящими полосами (на защитном слое и крылышках (при наличии)), фиксирующий слой защищен антиадгезионной бумагой.

17.10. Функциональное назначение одежды, должно обеспечиваться показателями, указанными в таблице 53а.

Таблица 53а.

№	Характеристика показателя	Величина показателя
1	2	3
1	Микробная проницаемость в сухом состоянии	не более 300CFU
2	Микробная проницаемость во влажном состоянии	не менее 2,8 BI
3	Чистота микробная	не более 300CFU/дм ²
4	Чистота в части инородных частиц	≤3,5 IPM
5	Прочность на растяжение в сухом состоянии	не менее 15Н
6	Прочность на растяжение во влажном состоянии	не менее 15Н

Примечание: Данные требования распространяются на следующие изделия: Халат хирургический (с усиленной защитной зоной или без нее); Куртка хирургическая; Брюки хирургические; Комбинезон; Фартук хирургический защитный; Наручники; Накладка медицинская.

Функциональное назначение белья, должно обеспечиваться показателями, указанными в таблице 536.

Таблица 536.

№	Характеристика показателя	Величина показателя
1	2	3
1	Микробная проницаемость в сухом состоянии	не более 300CFU
2	Микробная проницаемость во влажном состоянии	не менее 2,8 BI
3	Чистота микробная	не более 300CFU/дм ²
4	Чистота в части инородных частиц	≤3,5 IPM
5	Прочность на растяжение в сухом состоянии	не менее 15H

Примечание: Данные требования распространяются на следующие изделия: Чехол на конечности пациента; Простыня медицинская; Чехол на инструментальный столик; Чехол на медоборудование; Карман-приемник; Покрывало на оборудование; Пеленка хирургическая; Пеленка хирургическая с адгезивным слоем; Простыня на инструментальный столик; Простыня хирургическая; Покрытие хирургическое (на оборудование); Простыня хирургическая влагонепроницаемая; Простыня влагонепроницаемая с карманом; Простыня с адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, с липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, встроенным покрытием для ног, липкой операционной пленкой, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, адгезивным слоем (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, боковыми карманами, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной); Простыня с 2-мя отверстиями, адгезивным слоем, с липкой операционной пленкой (может быть с впитывающей зоной); Простыня с отверстием, адгезивным слоем, с карманом, отводом, липкой операционной пленкой.

17.11.Сшивание деталей изделий должно осуществляться нитками хлопчатобумажными по ГОСТ 6309, либо ультразвуковой либо термической сваркой (ширина шва 4 - 8 мм).

Методы обработки должны соответствовать промышленной технологии изготовления швейных изделий. Виды стежков, строчек и швов – в соответствии с ГОСТ 12807.

Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

Изделия не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

Изделия должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Средний срок годности изделий 5 лет с даты стерилизации

17.12. Потребительская (стерилизационная) упаковка изделий должна быть целостной (ГОСТ ISO 11607-2011).

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда и белье могут быть использованы в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах, социальных учреждениях.

18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту

19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

20. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации изделия должны быть нетоксичными и не вызывать местно-раздражающих и аллергических эффектов при контакте с неповрежденной кожей.

Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека.

Все работы по их производству должны проводиться в помещениях, оборудованных местной приточно-вытяжной вентиляцией. Применение открытого огня в этих помещениях запрещается.

Условия труда работающих – должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. Все работающие должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры по действующим приказам МЗ РФ.

Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке. Охрана окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.01. Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

21. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На территории Российской Федерации по вопросам, касающимся качества изделий: Одежда и белье медицинские одноразовые стерильные «БАРЬЕР» в комплектах и отдельных упаковках обращаться по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Барьер»

Юридический адрес: РФ, 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Гурзуфская, 12, оф. 6/3, телефон: (343)228-37-43, факс: (343)228-37-43,
e-mail: sg@barier.info.

Адрес места производства:

РФ, Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Александра Невского, 4

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

73 сильдесит Грис листов

Директор ООО «ПП «Барьер»

Будлянский Г.В.

