

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического
автоматического DH-615» в вариантах исполнения»**

Официальный производитель:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)

Tel: +86-755-26008015

Fax: +86 755 26746162

E-mail: intl@dymind.com

Наименование и адрес места производства:

«Шеньчжэнь Дайминд Биотехнологджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

(10-й этаж, здание В, парк высоких технологий, дорога Гуанцяо, микрорайон Тяньляо, подрайон Ютан, район Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)

Tel: +86-755-26008015

Fax: +86 755 26746162

E-mail: intl@dymind.com

Уполномоченный представитель в Российской Федерации

ООО «РЕАГЕНТИКА»

108802, Г.МОСКВА,

ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, Д. 1006, СТР. 1

Тел./Факс: +7 495 230 88 08

Электронная почта: mail@reagentika.ru

Утверждено:

Полное имя

Позднев Павел Владимирович

Должность:

Генеральный директор

Компания:

ООО «Реагентика»

Подпись:



Дата:

Печать:

16 ДЕК 2024



Hematology Control

Packaging Specification

Model: DM-6D
Specification: 3 mLx1 (L)


LOT 6D0624L

20240513

20240810

Attention:

1. POTENTIAL BIOHAZARDOUS MATERIAL For in vitro diagnostic use.
2. Protect tubes/vials from overheating and freezing.
3. This product by serology contagious index test negative, but still can't completely rule out the potential risk of infection, should be regarded as the specimen treated in operation.

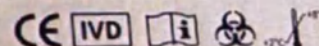

DYMIND

EC REP

Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476
Duesseldorf, Germany




Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

MIND
Approval
01

Вариант исполнения I «Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615» низкого уровня» в составе:

1. Гематологический контрольный материал DM-6D низкого уровня (L) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

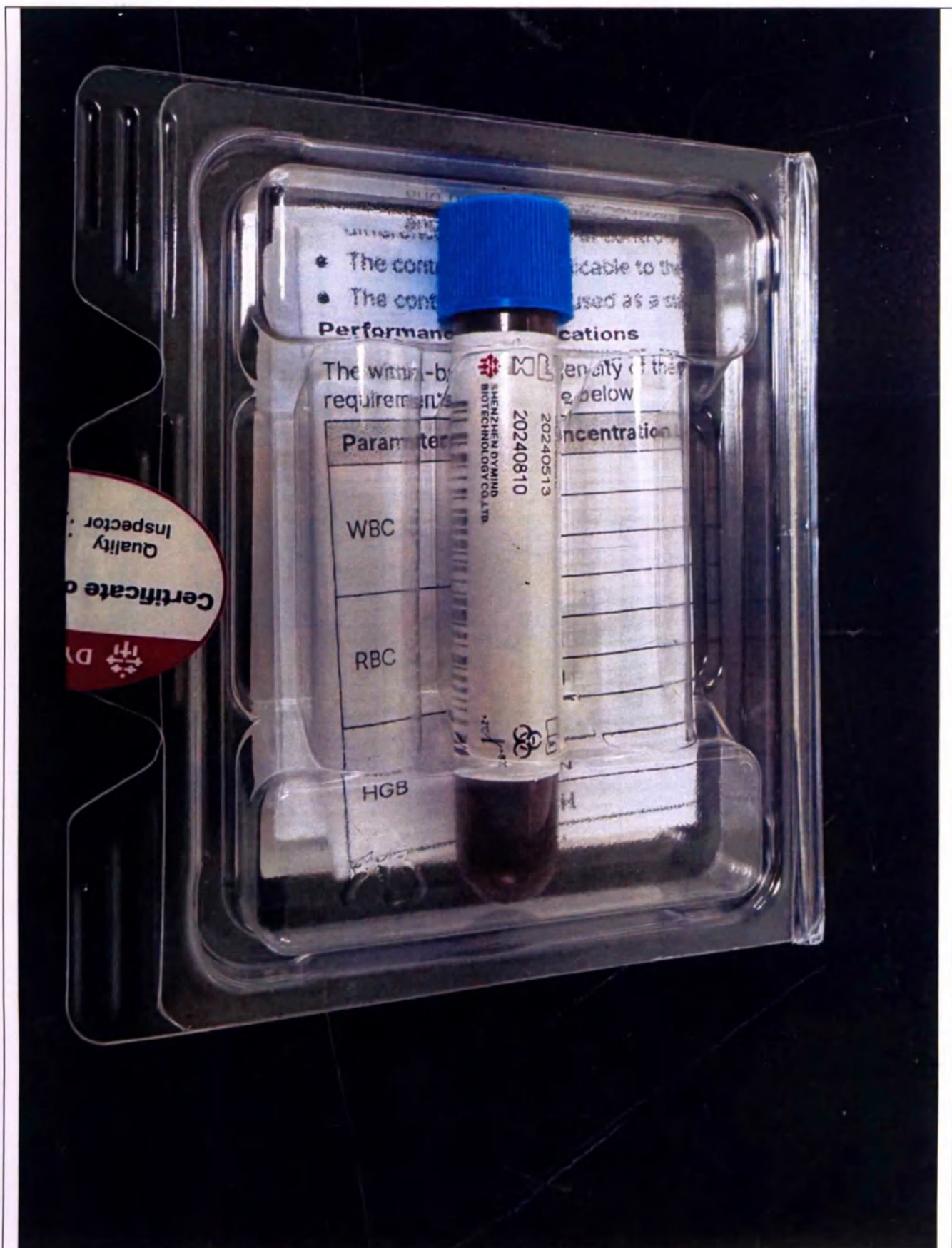

Вариант исполнения I «Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615» низкого уровня» в составе:

1. Гематологический контрольный материал DM-6D низкого уровня (L) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.




Компонент медицинского изделия: Гематологический контрольный материал DM-6D низкого уровня (L) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: Гематологический контрольный материал DM-6D низкого уровня (L) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: Гематологический контрольный материал DM-6D низкого уровня (L) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;

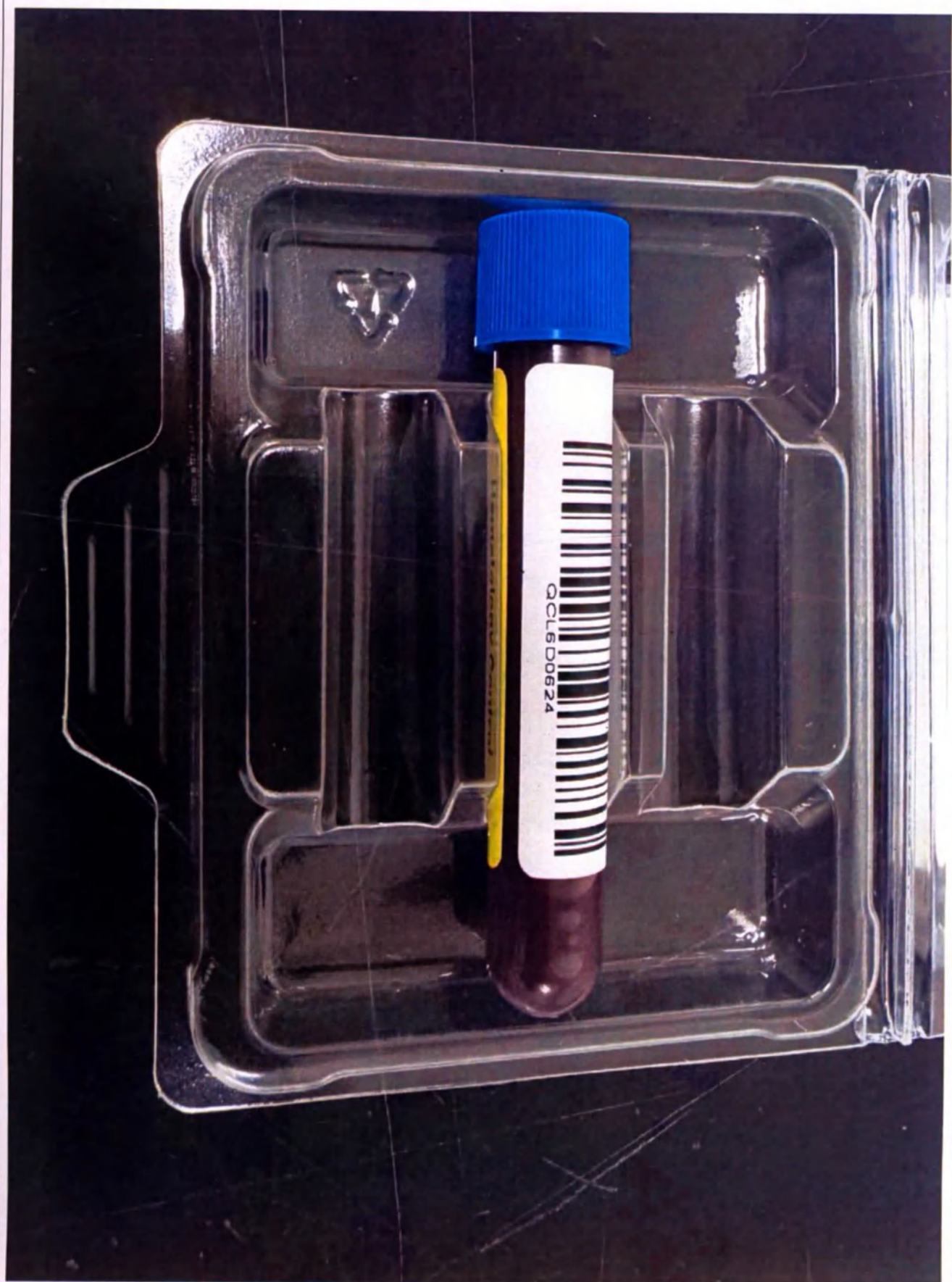

Компонент медицинского изделия: Гематологический контрольный материал DM-6D низкого уровня (L) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия
для диагностики *in vitro*


«Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического
автоматического DH-615» в вариантах исполнения»,
производства
«Шеньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

Компонент медицинского изделия : 2. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант исполнения II «Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического автоматического DN-615» среднего уровня» в составе:

1. Гематологический контрольный материал DM-6D среднего уровня (N) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

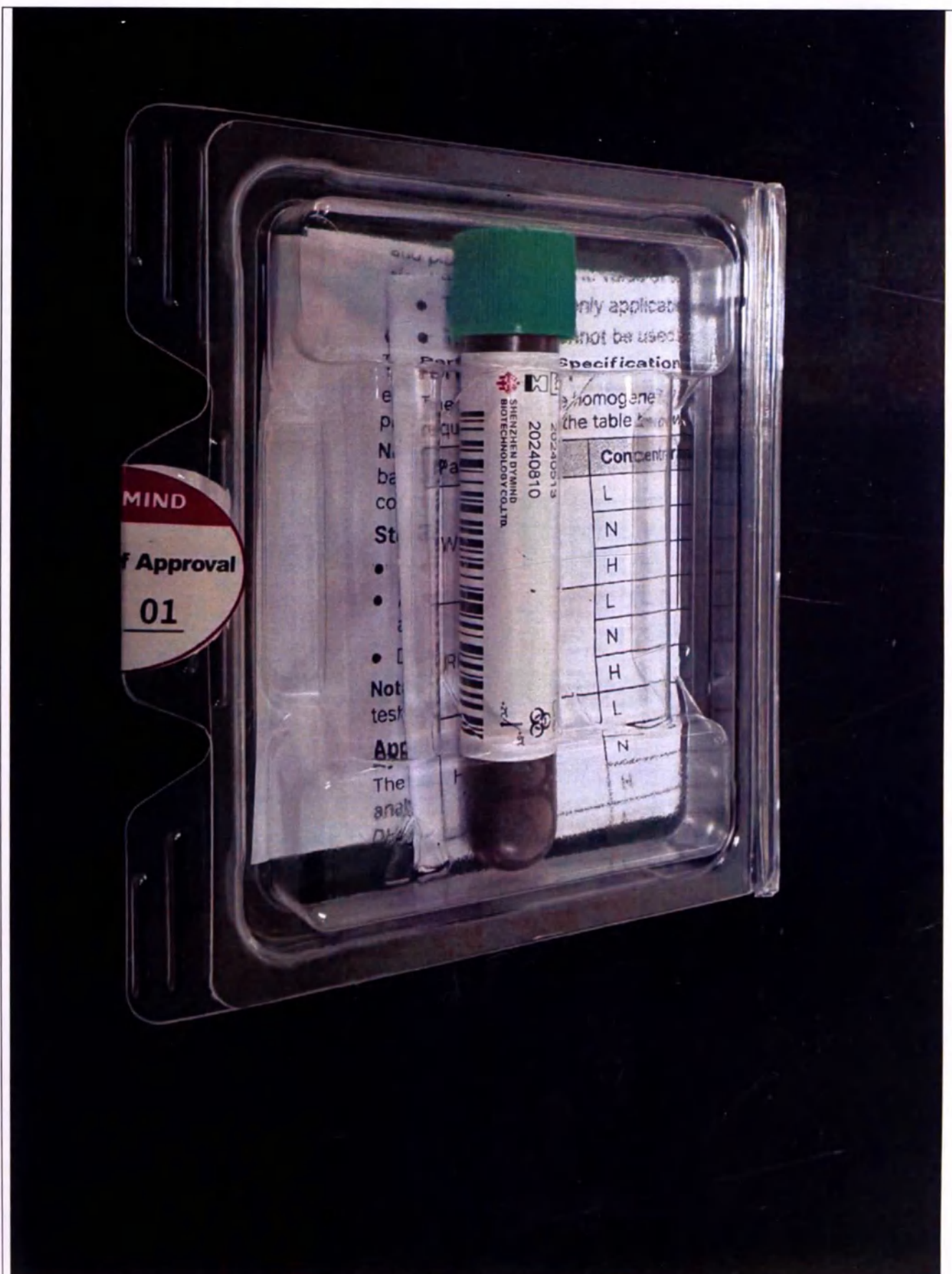

Вариант исполнения II «Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615» среднего уровня» в составе:

1. Гематологический контрольный материал DM-6D среднего уровня (N) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.




Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D среднего уровня (N) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;

3 mLx3 (H)
3 mLx1 (N)
3 mLx2 (N)

thread of the bottle and the cap with clean :
the cap, and put it back to the refrigerator. S
upright.

Interpretation of Test Results

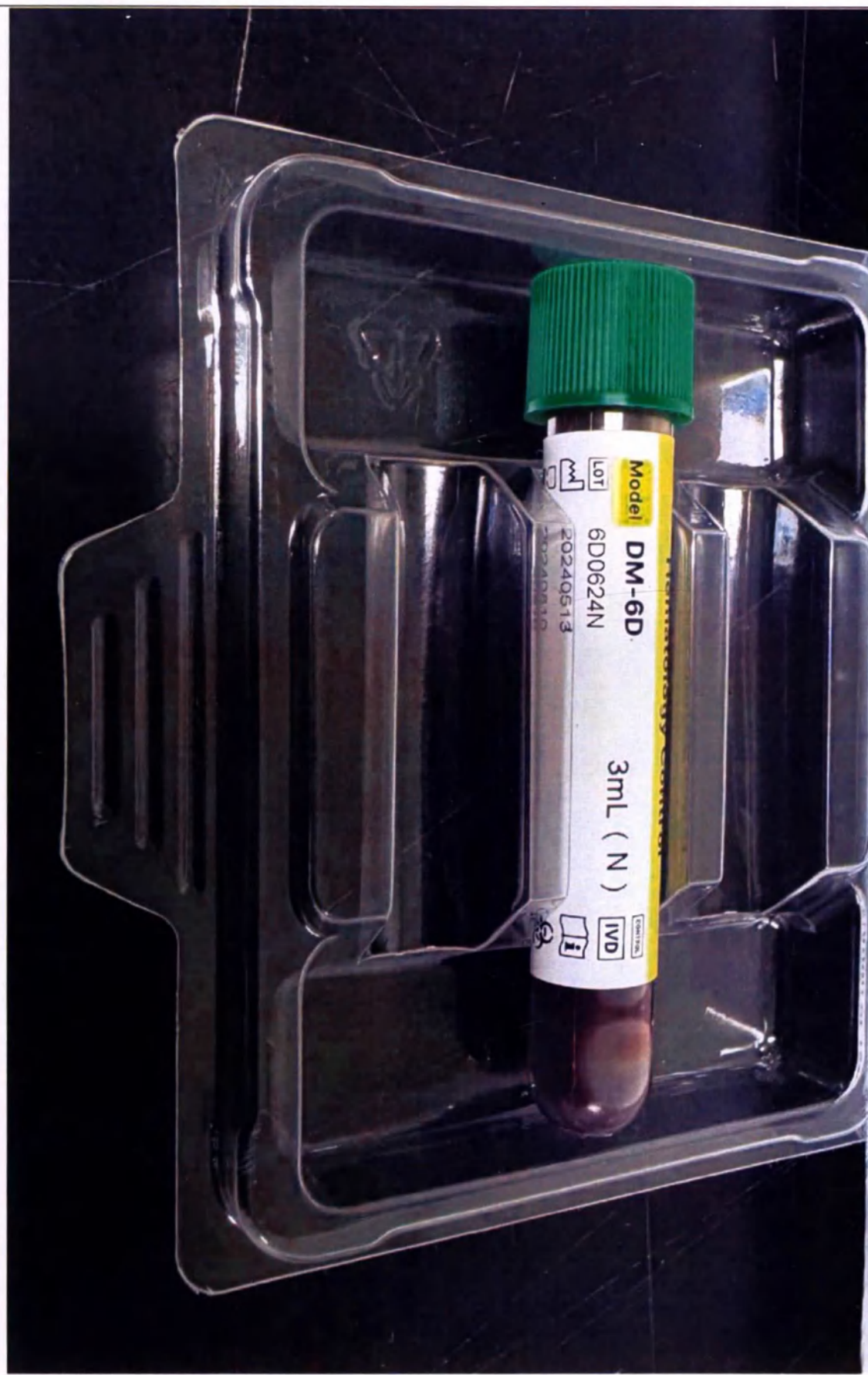

Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D среднего уровня (N)
(1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D среднего уровня (N) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D среднего уровня (N) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия
для диагностики *in vitro*

«Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического
автоматического DH-615» в вариантах исполнения»,
производства


«Шеньчжень Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

Компонент медицинского изделия : 2. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант исполнения III «Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615» высокого уровня» в составе:

1. Гематологический контрольный материал DM-6D высокого уровня (H) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

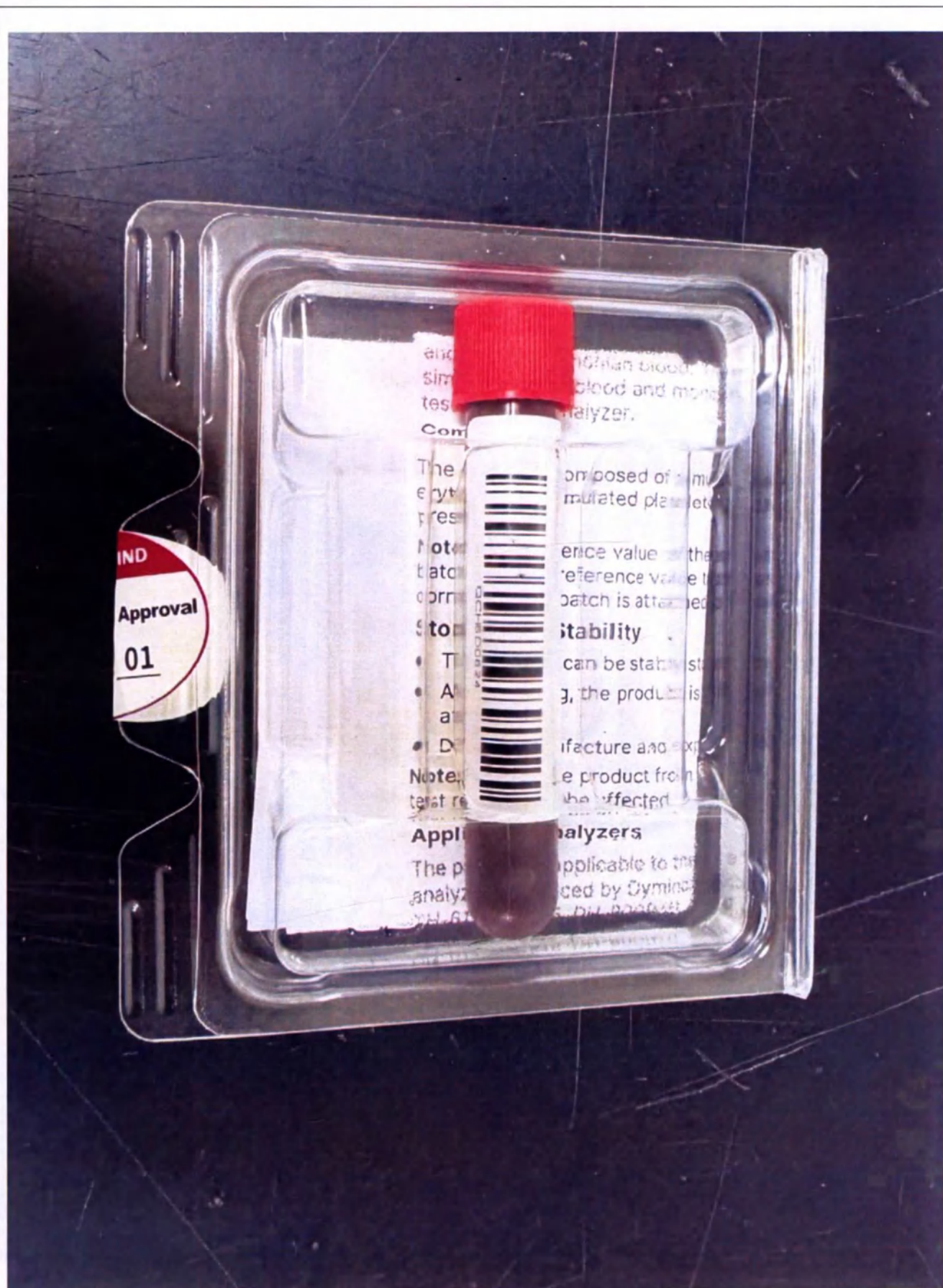

Вариант исполнения III «Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615» высокого уровня» в составе:

1. Гематологический контрольный материал DM-6D высокого уровня (H) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;

2. Инструкция по применению – 1 шт.



Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D высокого уровня (H) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D высокого уровня (H) (1 флакон по 3 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D высокого уровня (H) (1 флакон по 3 мл) – 1шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Гематологический контрольный материал DM-6D высокого уровня (Н) (1 флакон по 3 мл) – 1шт;



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия
для диагностики *in vitro*

«Гематологический контрольный материал DM-6D для «Анализатора гематологического
автоматического DH-615» в вариантах исполнения»,
производства
«Шеньчжень Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

Компонент медицинского изделия : 2. Инструкция по применению – 1 шт.

ПРОШТО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКЛЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

22/Саркисова/Исх. 706

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Позднев П.В.

