

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «НПЦ «ИНТЕРОКО»



Морозов В.П.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в вариантах исполнения:

1. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x34,5 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x34,5 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

2. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x50 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

3. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-002-55909893-2020 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x100 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

4. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x50 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

5. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x70 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x70 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

6. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x80 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x80 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.


7. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x100 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

8. Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x150 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

2025 г.

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х34,5 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х34,5 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)



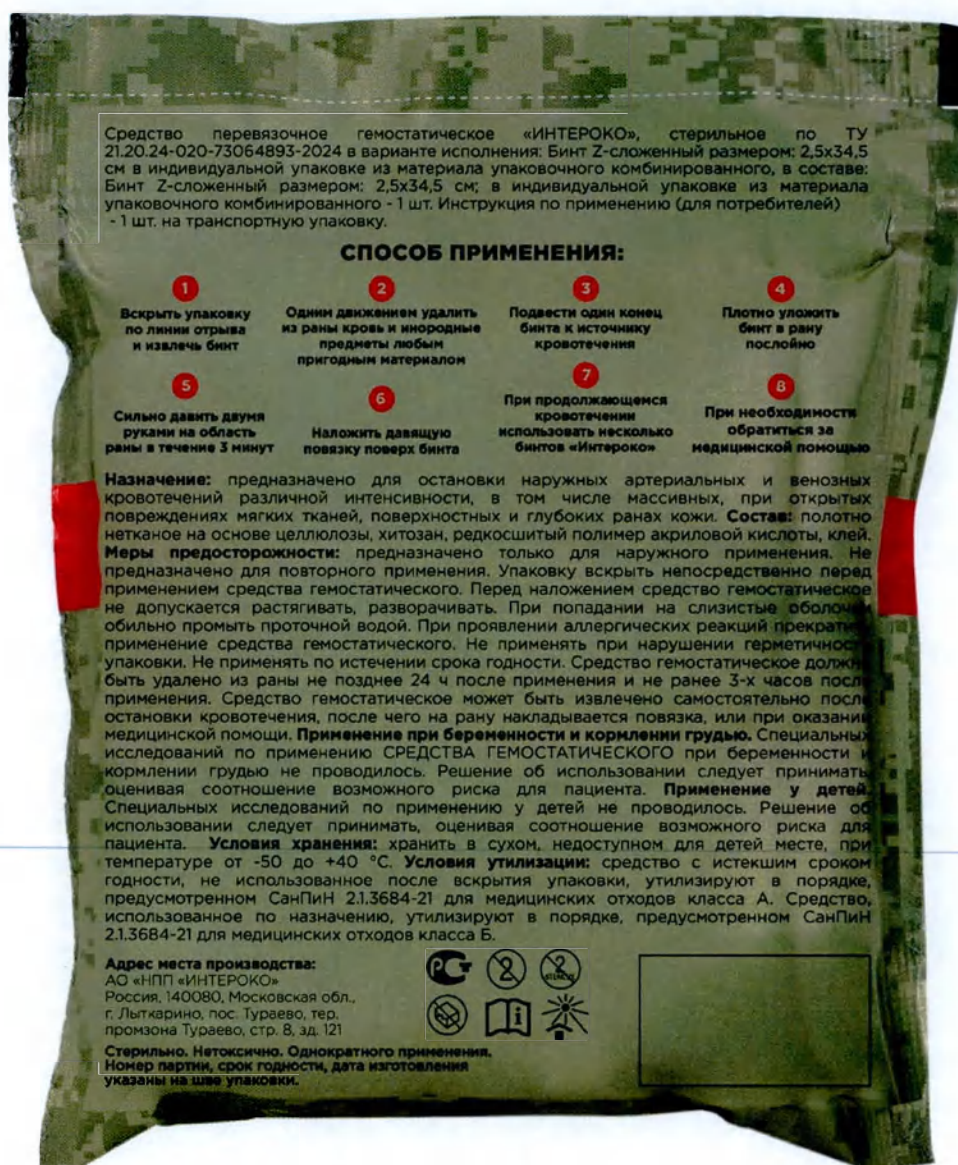

Макет индивидуальной упаковки

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**



ИНТЕРОКО

РАЗМЕР
2,5 x 34,5 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЗН _____

STERILE R

АО "НП "ИНТЕРОКО",
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино,
пос. Турово, пер. Горюхина Турово, стр. 8, 121

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: бинт Z-сложенный размером 2,5x34,5 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: бинт Z-сложенный размером 2,5x34,5 см, в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт	2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом	3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения	4 Плотно уложить бинт в рану послойно
5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут	6 Наложить давящую повязку поверх бинта	7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»	8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, радиационный полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +5 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО «НП "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Турово, пер.
Горюхина Турово, стр. 8, 121

Стерильно. Металлическое. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шее упаковки.

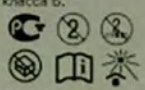


Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х50 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)





**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**

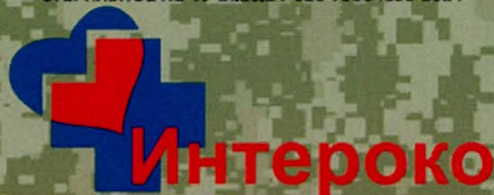

Интероко

РАЗМЕР
2,5 x 50 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЗН _____

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АО "НПЦ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл., г. Лютерино,
пос. Турайво, пер. Горюхова Турайво, стр. 36, 121

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5x50 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт., Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт, на транспортную упаковку.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт	2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом	3 Поднести один конец бинта к источнику кровотечения	4 Плотно уложить бинт в рану послойно
5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут	6 Наложить давящую повязку поверх бинта	7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»	8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редисшитый полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО «НПЦ «ИНТЕРОКО»
Россия, 140080, Московская обл., г. Лютерино, пос. Турайво, пер. Горюхова Турайво, стр. 36, 121

Стерильно. Непосредственно. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шее упаковки.

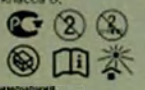

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-002-55909893-2020 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х100 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку
(Лицевая сторона)



(Оборотная сторона)


Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х100 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт
- 2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом
- 3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения
- 4 Плотно уложить бинт в рану послойно
- 5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут
- 6 Наложить давящую повязку поверх бинта
- 7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»
- 8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редкосшитый полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Тураево, тер.
промзона Тураево, стр. 8, зд. 121

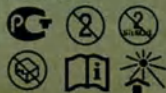

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

Макет индивидуальной упаковки

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**



РАЗМЕР
2,5 x 100 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЭН _____

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АО "НПЦ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл., Лыткарино,
пос. Туравино, пер. Голыгина Туравино, стр. 8, зд. 121

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения Бинт Z-Сложенный размером 2,5x100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе Бинт Z-Сложенный размером 2,5x100 см, в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт, Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт, на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1

Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт

2

Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом

3

Подвести один конец бинта к источнику кровотечения

4

Плотно уложить бинт в рану послойно

5

Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут

6

Наложить давящую повязку поверх бинта

7

При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»


8

При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редисципий полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО "НПЦ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Туравино, пер.
Голыгина Туравино, стр. 8, зд. 121

Стерильно. Метоксичино. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шее упаковки.

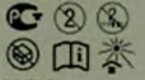

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х50 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)



(Оборотная сторона)


Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х50 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт
2. Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом
3. Подвести один конец бинта к источнику кровотечения
4. Плотно уложить бинт в рану послойно
5. Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут
6. Наложить давящую повязку поверх бинта
7. При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»
8. При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редкосшитый полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Тураево, тер.
промзона Тураево, стр. 8, зд. 121

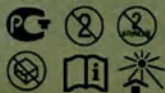

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

Макет индивидуальной упаковки

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**



Интероко

РАЗМЕР
8,0 x 50 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЗН _____

АО "НПП "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино,
пос. Тураево, территория Тураево, стр. 8, 121

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения. Бинт Z-сложенный размером 8,0x50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером 8,0x50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного – 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт	2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом	3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения	4 Плотно уложить бинт в рану послойно
5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут	6 Наложить давящую повязку поверх бинта	7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»	8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редисшитый полимер акриловой кислоты, клей.


Меры предосторожности: предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средства гемостатического не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи.

Применение при беременности и кормлении грудью. Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО "НПП "ИНТЕРОКО"
Россия, МОЗВО, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Тураево, тер.
промзона Тураево, стр. 8, 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

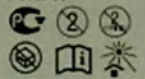

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х70 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х70 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)



Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х70 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х70 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт
- 2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом
- 3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения
- 4 Плотно уложить бинт в рану послойно
- 5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут
- 6 Наложить давящую повязку поверх бинта
- 7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»
- 8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редкосшитый полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Тураево, тер.
промзона Тураево, стр. В, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

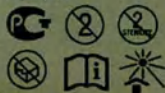

Макет индивидуальной упаковки

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**



**РАЗМЕР
8,0 x 70 см**



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЭН _____

АО "НПЛ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140040, Московская обл., г. Лыткарино,
пос. Туравао, тер. городского Туравао, стр.8, зд. 121

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером 8,0x70 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером 8,0x70 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт	2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом	3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения	4 Плотно уложить бинт в рану похлопывая
5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут	6 Наложить давящую повязку поверх бинта	7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»	8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редисшитый полимер акриловой кислоты, клей.

Меры предосторожности: предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО "НПЛ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140040, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Туравао, тер.
городского Туравао, стр.8, зд. 121


Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шее упаковки.

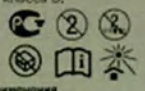

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x80 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x80 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)



(Оборотная сторона)

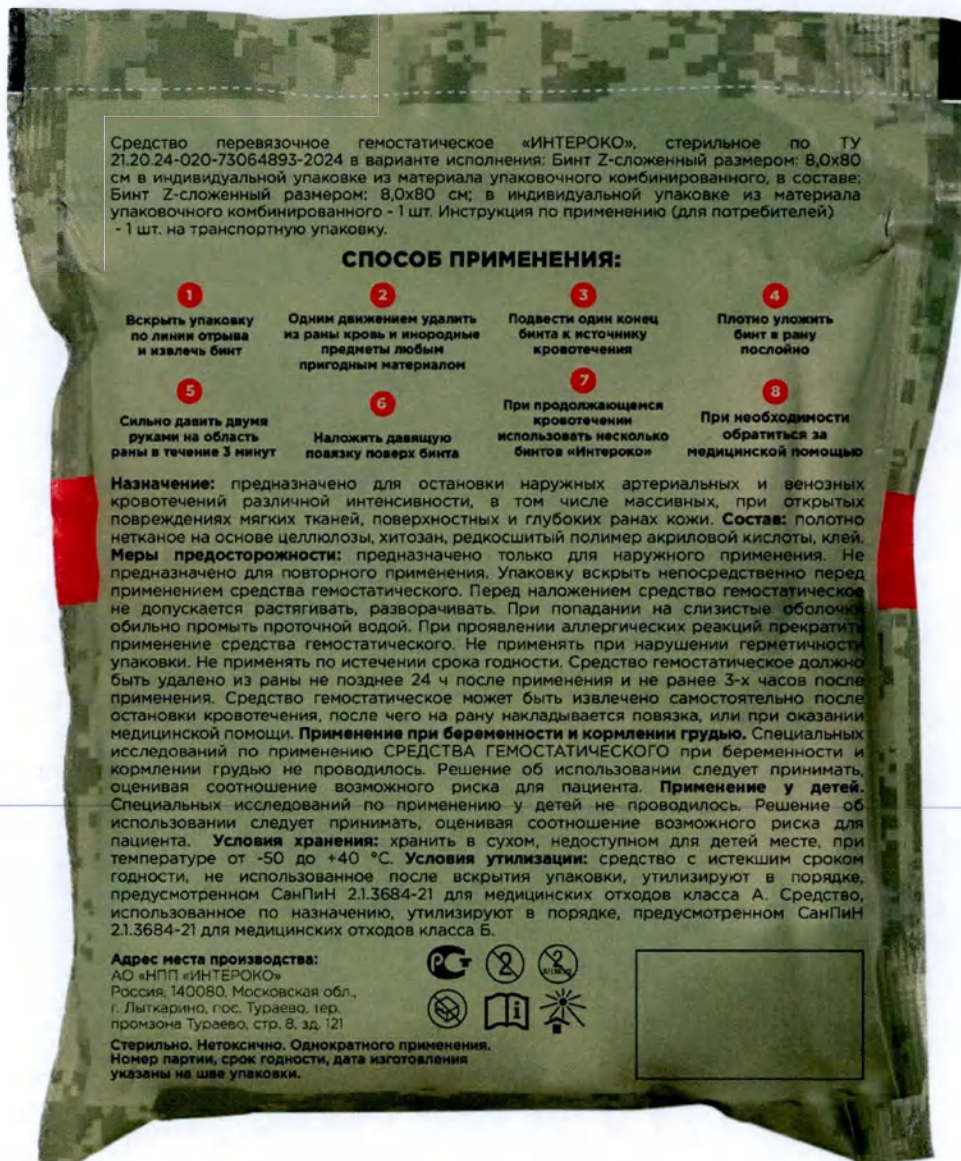

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**



Интероко

РАЗМЕР
8,0 x 80 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЗН _____

АО "НПП "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино,
пос. Тураево, пер. Горького Тураево, стр. 8, кд. 121

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x80 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: бинт Z-сложенный размером: 8,0x80 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт	2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом	3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения	4 Плотно уложить бинт в рану послойно
5 Сильно давить двумя руками из область раны в течение 3 минут	6 Наложить давящую повязку поверх бинта	7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»	8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** плотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редисшитый полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса В.


Адрес места производства:
АО "НПП "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино, пос. Тураево, пер. Горького Тураево, стр. 8, кд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления указаны на шве упаковки.

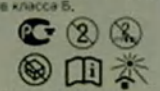

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x100 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)



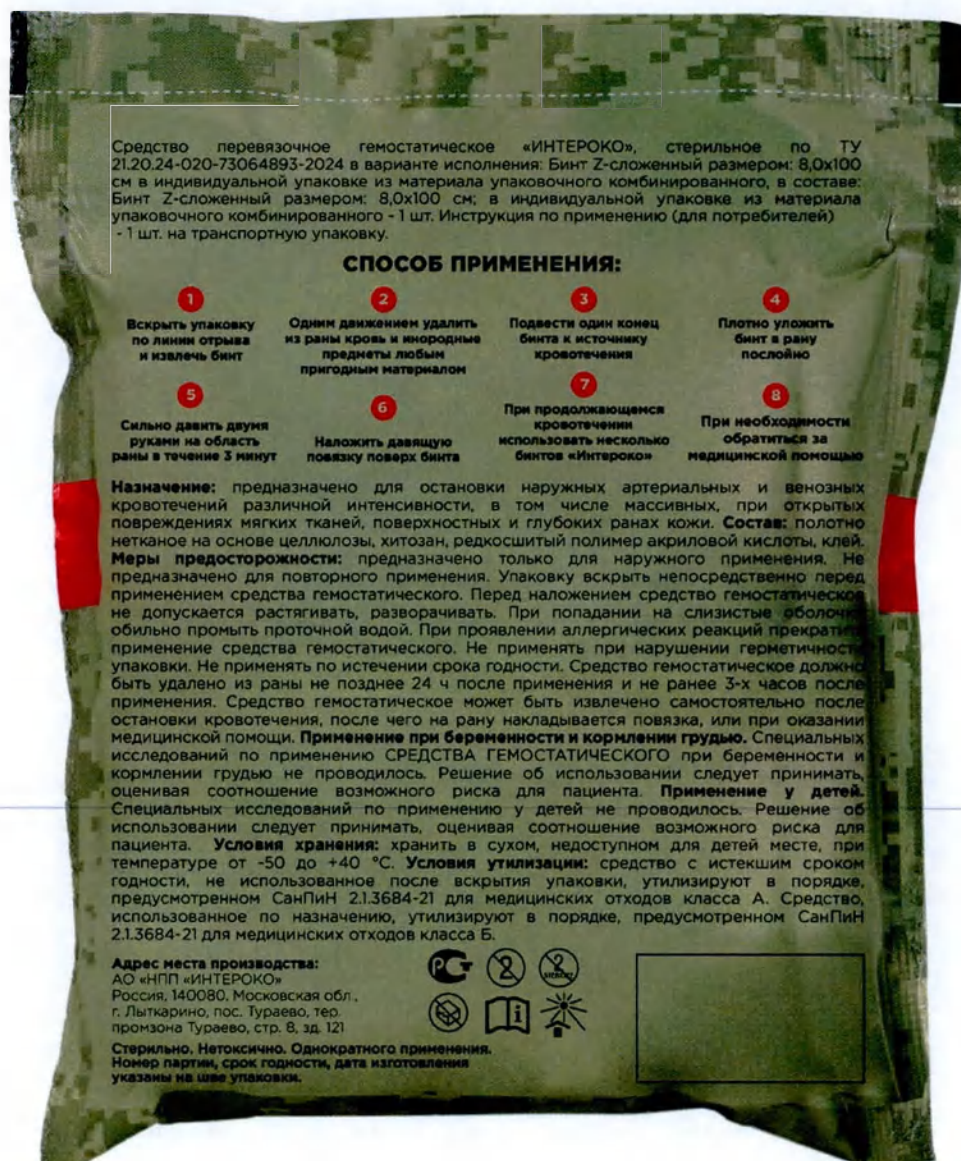

Макет индивидуальной упаковки

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024**



РАЗМЕР
8,0 x 100 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЗН _____

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АО "НП "ИНТЕРОКО"
Россия, 140600, Московская обл., г. Лыткарино,
пос. Турава, тер. городского Турава, стр. 8, зд. 121

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в виде Z-сложенного бинта размером 8,0х100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером 8,0х100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт	2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом	3 Поднести один конец бинта к источнику кровотечения	4 Плотно уложить бинт в рану послойно
5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут	6 Наложить давящую повязку поверх бинта	7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»	8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, радиосшитый полимер акриловой кислоты, клей.

Меры предосторожности: предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-01 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-01 для медицинских отходов класса Б.

Адрес места производства:
АО "НП "ИНТЕРОКО"
Россия, 140600, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Турава, тер.
городского Турава, стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

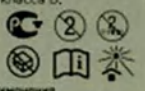

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного: Бинт Z-сложенный размером: 8,0х150 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.
(Лицевая сторона)



(Оборотная сторона)


Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x150 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт
- 2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом
- 3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения
- 4 Плотно уложить бинт в рану послойно
- 5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут
- 6 Наложить давящую повязку поверх бинта
- 7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко»
- 8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редкошпигитый полимер акриловой кислоты, клей. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.


Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Тураево, тер.
промзона Тураево, стр. 8, зд. 121

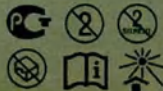

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ «ИНТЕРОКО»,
СТЕРИЛЬНОЕ ПО ТУ 21.20.24-020-73064893-2024

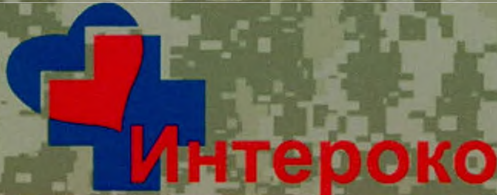

РАЗМЕР
8,0 x 150 см



БИНТ Z-СЛОЖЕННЫЙ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

№ РЗН _____

АО "НПЛ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл., г. Лыткарино,
пос. Тураново, пер. Горьковского, Тураново, стр. 8, кв. 121

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 8,0x150 см, в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного – 1 шт., Инструкция по применению (для потребителей) – 1 шт. на транспортную упаковку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


1. Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.
2. Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом.
3. Подвести один конец бинта к источнику кровотечения.
4. Плотно уложить бинт в рану послойно.
5. Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.
6. Наложить давящую повязку поверх бинта.
7. При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Интероко».
8. При необходимости обратиться за медицинской помощью.


Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** полотно нетканое на основе целлюлозы, хитозан, редисшитый полимер акриловой кислоты, клей.

Меры предосторожности: предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Применение при беременности и кормлении грудью.** Специальных исследований по применению СРЕДСТВА ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО при беременности и кормлении грудью не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Применение у детей.** Специальных исследований по применению у детей не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Условия утилизации:** средство с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Средство, использованное по назначению, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса Б.


Адрес места производства:
АО "НПЛ "ИНТЕРОКО"
Россия, 140080, Московская обл.,
г. Лыткарино, пос. Тураново, пер.
Горьковского, Тураново, стр. 8, кв. 121

Стерильно. Неотосично. Одноразового применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шее упаковки.

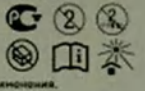

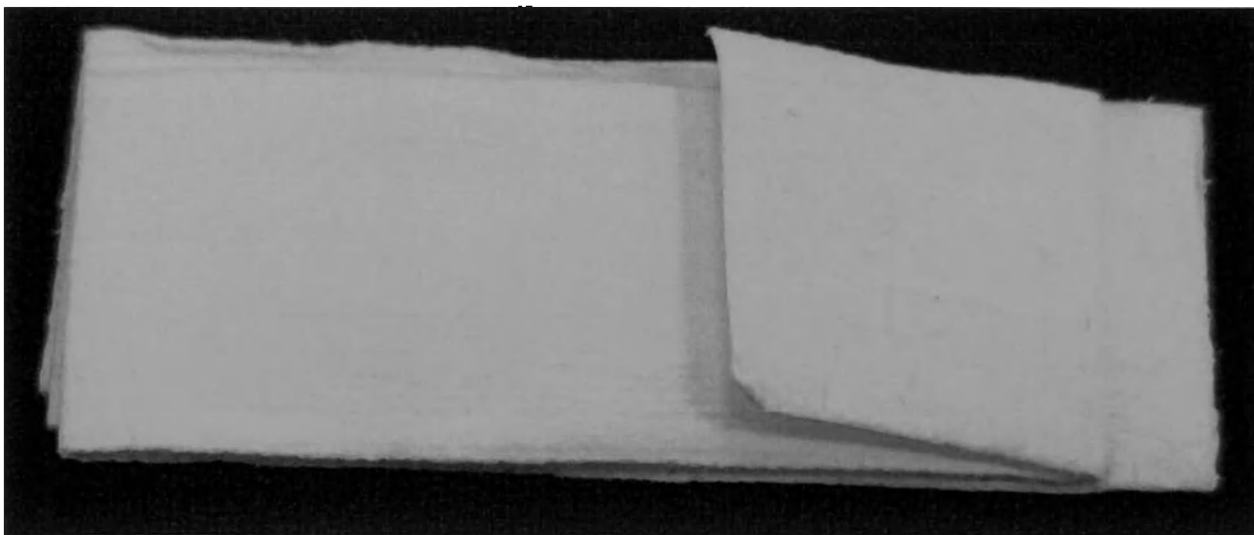

Бинт: полотно нетканое термоскрепленное из целлюлозных и синтетических волокон, производства ООО «Технология пленки», Россия

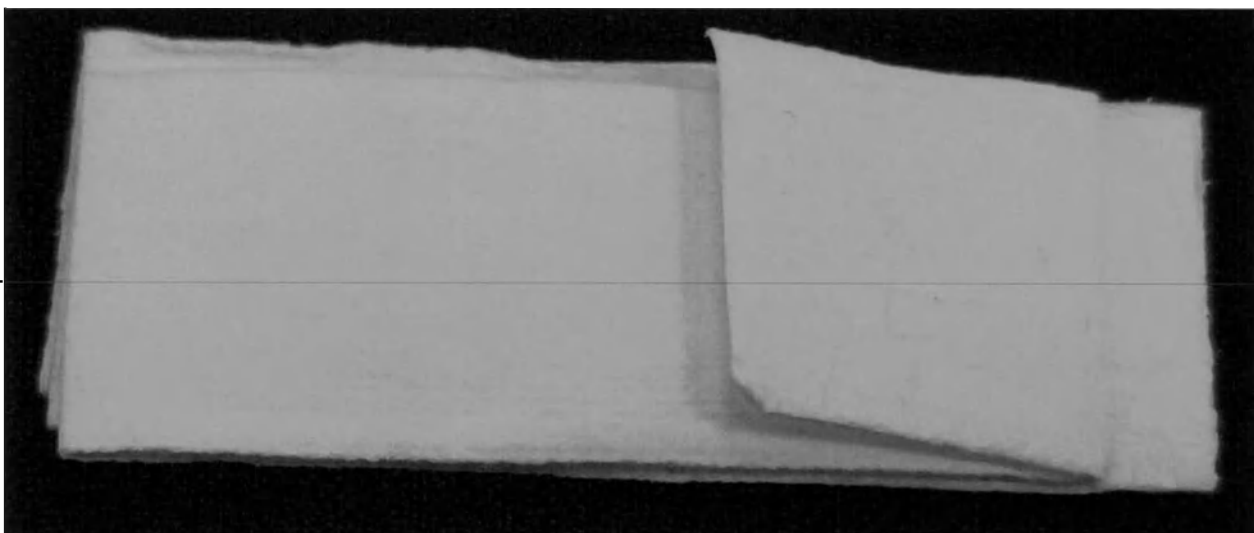

Бинт: полотно нетканое термоскрепленное марки VIZORB® 3062 (MBALL 70) производ-ства «Глатфельтер Штейнфурт ГмБх», Германия

Пример маркировки транспортной (групповой) упаковки
Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в вариантах исполнения

Наименование изделия	Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в вариантах исполнения		
Вариант исполнения	Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х34,5 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х34,5 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.		
Номер партии			
Производитель	АО «НПП «ИНТЕРОКО» 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер. промзона Тураево, стр. 8, зд. 121		
Место производства	АО «НПП «ИНТЕРОКО» 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер. промзона Тураево, стр. 8, зд. 121		
Количество изделий	Шт.		
Дата изготовления			
Срок годности	3 года с даты стерилизации		
Условия хранения	Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от - 50°С до + 40 °С		
Утилизация	Средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.		
Вес брутто, кг			
Номер и дата регистрационного удостоверения	РУ № от г.		
Выпуск по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024			
«Нетоксично»	Штрих-код		

Пример упаковочного листа

Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в вариантах исполнения: Средство перевязочное гемостатическое «ИНТЕРОКО», стерильное по ТУ 21.20.24-020-73064893-2024 в варианте исполнения: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х34,5 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного, в составе: Бинт Z-сложенный размером: 2,5х34,5 см; в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного - 1 шт. Инструкция по применению (для потребителей) - 1 шт. на транспортную упаковку.	
Производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер. промзона Тураево, стр. 8, зд. 121.	
Место производства АО «НПП «ИНТЕРОКО», 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, п. Тураево, тер. промзона Тураево, стр. 8, зд. 121.	
число изделий в упаковке, шт	
условный номер упаковщика и контролера	
дата упаковывания	











Всего прошито, пронумеровано и
креплено печатью 32 лист(ов)
Директор
Ю «НПП» «ИНТЕРОКО»
Игорзов В.П.
05 " 03 " 20 25 г.