

ИЗДЕЛИЯ

медицинской

«ОРТОРЕНТ»

физкультурно-

весия и учёт

ий: в условия

ФК; а также

тс к классу

ии №4н о

кер относитс

эксплуатаци

ся к групп

Р 50444

относится к

атформа для

и и тверды

1.2 Общее описание основных функциональных элементов медицинского изделия

Тренажер представляет собой конструкцию из поручней для опоры рук, обвязок и платформы для ходьбы для устойчивости тренажера. Тренажер изготавливается в двух вариантах исполнения в зависимости от конструктивных особенностей. Каждая модель оснащена механизмами регулировки высоты и ширины поручней, что позволяет адаптировать тренажер под антропометрические данные пациента.

1) Модель-1 оснащена электропитанием для автоматизированной регулировки высоты и ширины поручней. Дополнительное оснащение модульным ортопедическим ковриком в качестве принадлежности позволяет проводить мягкий массаж стоп для пациентов с повышенной чувствительностью, в том числе пациентов детского возраста (от 10 лет).

2) Модель «Брусья-лестница» имеет возможность проведения терапии как на плоской поверхности, так и с использованием ступеней. Высота ступеней производится автоматизировано с использованием подъёмных колонн и пульта управления, работающего от электропитания. Регулировка высоты и ширины поручней осуществляется вручную.

Типовые внешние виды моделей тренажера в виде параллельных брусьев представлены на рисунках 1 – 2.



Рисунок 1 – Общий вид.

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы
«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1

Таблица 1.1. – Основные размеры тренажера: Модель-1

Обозначение	Размер, мм	Допустимое отклонение, мм
Длина брусьев	2980	±10
Длина основания (платформы)	2410	±10
Общая длина	3180	±10
Расстояние между брусьями	560 / 740	±10
Длина пандуса	350	±10
Общая ширина	720	±10

Обозначение	Размер, мм	Допустимое отклонение,
Толщина основания без учёта рабочей поверхности	50	± 5
Толщина основания с учётом рабочей поверхности	100	± 5
Толщина пандуса	21	± 5
Высота без учёта толщины поручней	820	± 10
Общая высота	870 / 1380	± 10



Рисунок 2 – Общий вид.

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA».
Модель «Брусья-лестница»

Таблица 1.2. – Основные размеры тренажера модели «Брусья-лестница»


Обозначение	Размер, мм	Допустимое отклонение, мм
Общая длина	3600	± 10
Общая высота при опущенной платформе	790	± 10
Высота максимально поднятой платформы	640	± 10
Высота максимального поднятия поручней	1610	± 10
Длина основания	2340	± 10
Общая ширина	890	± 10

**Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы
«ОРТОПЕНТ CARMINA». Модель-1**




Общий вид

**Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы
«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель-1**

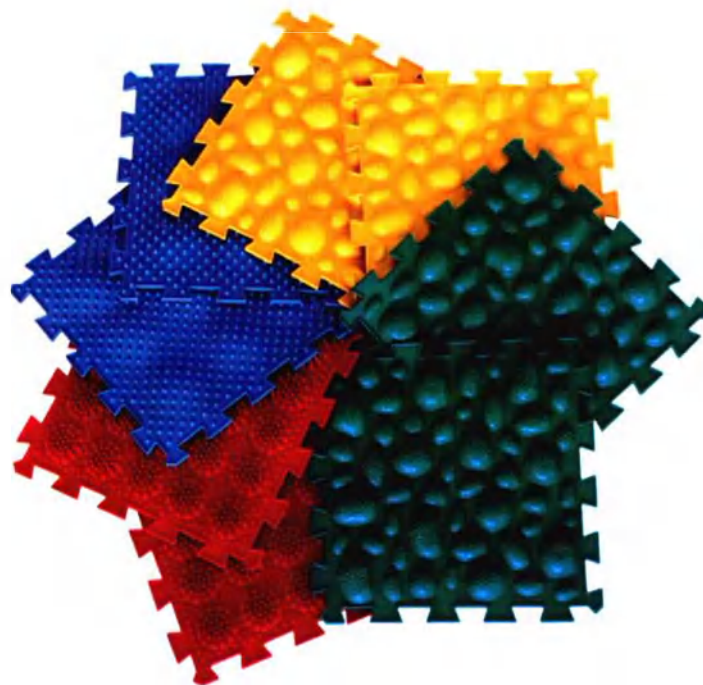

**Коврик массажный (ортопедический) модульный «ОРТО ПАЗЛ»
по ТУ 32.50.22-003-229575282-2017, производитель: ООО
«ЛидерПолимер», Россия, РУ № РЗН 2018/6797**

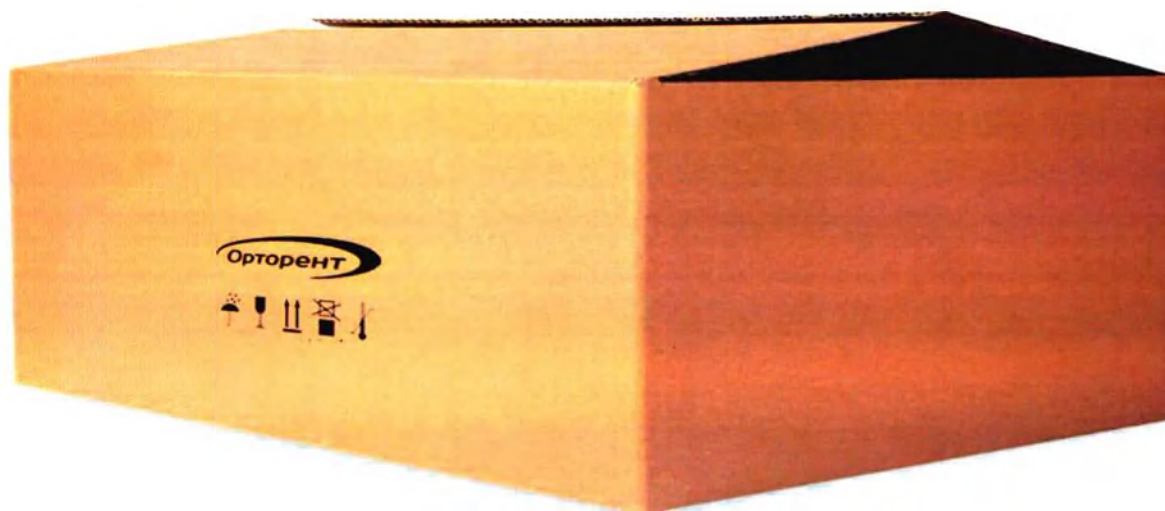


Упаковка


Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» Великов С. А.



**Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы
«ОРТОРЕНТ CARMINA». Модель «Брусья-лестница»**

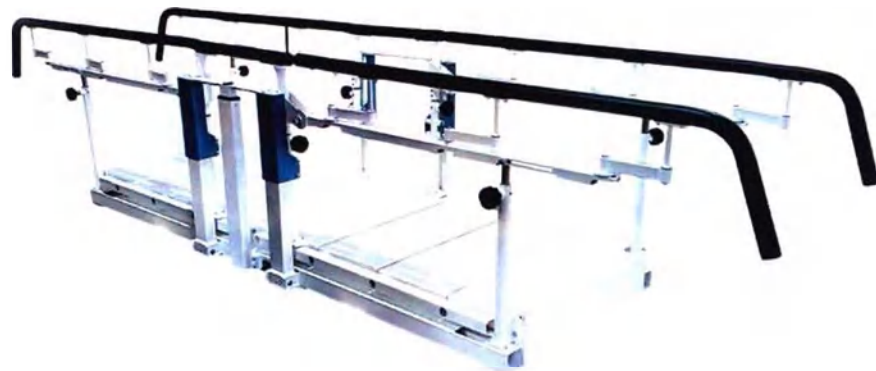

Общий вид

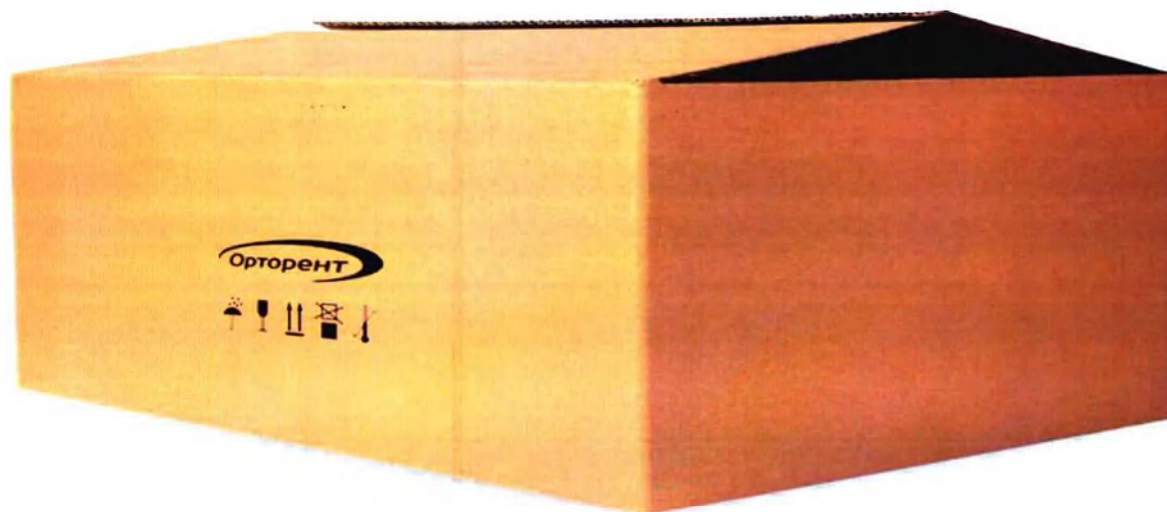

Упаковка

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» _____ Великов О. А.





Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы
«ОРТОРЕНТ CARMINA»
по ТУ 32.50.50-022-11363852-2020

Сделано в России

Модель «Брусья-лестница»

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 0,5 кВА

Максимальная масса пациента: 125 кг

Повторно-кратковременный режим работы

подъемных колонн: работа 10 минут, перерыв 5 минут

IP52



Серийный номер: 01



09.09.21



142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7(495)649-62-28, e-mail: info@ortorent.ru

ООО "Орторент"

Образец маркировки

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA»

Модель-1



Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы
«ОРТОРЕНТ CARMINA»
по ТУ 32.50.50-022-11363852-2020

Сделано в России

Модель - 1

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 0,5 кВА

Максимальная масса пациента: 125 кг

IP52



Серийный номер: 01



09.09.21



142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7(495)649-62-28, e-mail: info@ortorent.ru

ООО "Орторент"

Образец маркировки

Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы «ОРТОРЕНТ CARMINA»

Модель «Брусья-лестница»

