

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Ресурсы и сроки службы

3.1.1 Средняя наработка на отказ не менее 20000 часов в течение среднего срока службы 5 лет.

3.1.2 Указанная наработка и срок службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 9452-004-93204178-2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия по назначению - 12 месяцев со дня приобретения потребителем.

3.2.3 Послегарантийный ремонт осуществляет изготовитель за отдельную плату по согласованию с потребителем.

3.2.4 По всем вопросам, возникшим при эксплуатации изделия, обращаться по следующему адресу:

300004, Россия, г. Тула, Веневское шоссе, дом 4, корпус 18, а/я 1097, ЗАО "Атриум".

Тел./факс (4872) 46-57-48, 46-57-49.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Консоль световая палатная КСП ТУ 9452-004-93204178-2010, заводской номер Е 115 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК
МП 22 04. 2020
Личная подпись год, месяц, число

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для окружающей среды и может быть подвергнуто утилизации по усмотрению потребителя. Специальных мер по утилизации не требуется.

94 5250

Утвержден АРУМ.942817.001-ПС

КОНСОЛЬ СВЕТОВАЯ ПАЛАТНАЯ

КСП

Паспорт

АРУМ.942817.001-ПС



Генеральный директор Генерков АВ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Консоль световая палатная КСП, ТУ 9452-004-93204178-2010, заводской номер Е 115 изготовлена 22.04.2010 ЗАО "Атриум", расположенным по адресу: 300004, г. Тула, Веневское шоссе, дом 4, корпус 18.
Тел./факс (4872) 46-57-48, 46-57-49.

1.1 Назначение изделия

Изделие предназначено для стационарной установки на стене и может использоваться в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи. Осуществляет газовую коммутацию клапанов подачи медицинских газов, предназначенную для подключения аппаратуры жизнеобеспечения пациентов к системам центральных разводок газовых сетей.

Для обеспечения электрического питания консоли и внешней аппаратуры изделие подключается к однофазной общепромышленной электросети переменного напряжения (220 ± 22) В, частотой (50 ± 0,5) Гц, а газораспределительная часть к стационарной газопроводящей системе лечебных газов.

Изделие может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от + 10 до + 35 °С и относительной влажности 45-80 % при температуре (25 ± 10) °С.

Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос», или 1% раствором хлорамина.

1.2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более..... 75x1500x205
Масса, кг, не более..... 15
Предельное рабочее давление в газовых магистралях, мПа, не более..... 1,0
Пропускная способность пневматического клапана:
а) на кислород, закись азота, углекислый газ, сжатый воздух, аргон при давлении на входе в клапаны 0,6±0,025мПа, л/мин., не менее.....40
Усилие подключения штекеров к пневматическому клапану, кгс, не более.....6
Выходное фазное напряжение с частотой (50 ± 0,5 Гц), В.....220 ± 22
Электрическая мощность подключаемых к одной розетке изделия электроаппаратов, кВт, не более.....2
Суммарная потребляемая мощность изделия вместе с подключаемой электроаппаратурой, кВт, не более.....5
Средняя наработка на отказ, час, не менее.....20000
Средний срок службы, лет, не менее.....5

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.	Примечание
Консоль световая палатная КСП		1	
Газовый клапан		1	
Газовый штекер		1	
Электрическая розетка 220 В		4	
Выключатель верхнего света		1	
Выключатель нижнего света		1	
Паспорт	АРУМ. 942817.001ПС	1	
Упаковка	АРУМ. 321144.001	1	