

УТВЕРЖДАЮ

ВНМО Директора
ФГУП «ЭПМ» ФМБА России
С.А. Мамонов
_____ 2015 г.



**ИНСТРУКЦИЯ
по применению
«Бандаж ортопедический БН по ТУ 9396-024-45866562-2014»**

Разработка, производство и реализация изделий «Бандаж ортопедический БН» по ТУ 9396-024-45866562-2014» осуществляется Федеральным государственным унитарным предприятием «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России).

Адрес: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, 5 стр.2

Телефон/Факс: +7(499)190-64-24/60.

Адрес места производства медицинского изделия

Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г.Москва, ул. Щукинская, 5 стр.2. Тел/факс: +7(499)190-6424/60, epm.fmba@mail.ru

Назначение.

«Бандаж ортопедический БН» по ТУ 9396-024-45866562-2014» (далее по тексту бандаж) предназначен

- на шейный отдел позвоночника мягкой фиксации, для профилактики осложнений, поддержки поврежденных мышц и связок шейного отдела позвоночника;

- фиксирующий послеоперационный на брюшную область, - дородовой (послеродовой), для профилактики послеоперационных осложнений, иммобилизации и поддержки поврежденных или болезненных суставов, мышц или конечностей в целом, а также для удержания передней брюшной стенки и внутренних органов в нормальном анатомическом положении во время беременности, до и после родов, при грыжах брюшной стенки.

- фиксирующий послеоперационные на грудную область, при оперативном вмешательстве и травмах в области грудной клетки; препятствует расхождению швов; нормализует внутригрудное давление.

- для широкого пеленания младенцев, для фиксации тазобедренного сустава в положении отведения и сгибания, что способствует правильному формированию вертлужной впадины.

Бандажи изготавливаются для детей и взрослых индивидуально и массово в соответствии с определёнными типоразмерами.

Бандаж относится к виду - изделия травматологические и ортопедические. Код ОКП 93 9690, класс потенциального риска применения изделия – 1.