



«Утверждаю»

ген. директор ООО «Целит»

Блажко В.А.

«25» 01.01.2010 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЦЕМЕНТ
ЦИНК-СУЛЬФАТНЫЙ – МАТЕРИАЛ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ
БЕЗЭВГЕНОЛЬНЫЙ
«КАВИСИЛ»**

ТУ 9391-006-10614163-99

Назначение изделия:

Материал «Кависил» предназначен для временной изоляции лекарственного вещества в кариозной полости зуба и временных пломб.

Состав

«Кависил» состоит из сульфата цинка, оксида цинка, сополимера, пластификатора, модифицирующих добавок.

Технические характеристики:

«Кависил» представляет собой готовую к применению пластичную пасту розового цвета. Это полимерный, безмасляный, безэвгенольный, быстротвердеющий, временный пломбировочный материал, обладает бактериостатическими свойствами. Отверждение в полости зуба происходит под действием влаги слюны, при этом «Кависил» слегка расширяется, обеспечивая герметичное пломбирование. Материал имеет низкую теплопроводность, изолируя пульпу от теплового воздействия.

Порядок работы

Внести необходимое количество материала в подготовленную полость зуба, сконденсировать его и очистить точки окклюзионных контактов. Время нахождения материала в полости зуба до двух месяцев. После использования удалит материал бором.

Комплект поставки:

«Кависил» выпускается в полимерных банках по 50 грамм.

Условия хранения:

Хранить в сухом помещении при температуре от 5°C до 23°C в плотно закрытой банке.

Подготовил:

Вед. инженер-технолог Никифорова Ю.С.