



«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Целит»

Л.Г. Андреева

2016г.

Код 1.2.2.1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ ЦИНК-ОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

#### «ЭНДОВИТ»

ТУ 9391-034 -10614163-2005

Рег.уд. № ФСР2010/07973 от 11.06.2010 г.

Для профессионального применения врачами стоматологами

#### НАЗНАЧЕНИЕ

«Эндовит» - цинк-оксидэвгенольный материал применяется для постоянного пломбирования корневых каналов зубов после витальной экстирпации пульпы, обладает противовоспалительным действием.

#### СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Эндовит» выпускается в виде порошка и жидкости.

В состав порошка входят: оксид цинка, рентгеноконтрастный наполнитель.

В состав жидкости входят: эвгенол и тимол.

Пломбировочный материал «Эндовит» не рассасывается в корневом канале, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, рентгеноконтрастный.

«Эндовит» может применяться в качестве силлера с гуттаперчевыми штифтами.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аллергические реакции на эвгенол и другие компоненты материала.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед употреблением баночку с порошком хорошо встряхнуть.

Для получения пластичной пасты, смешать порошок и жидкость в весовом соотношении 2,5:1, что соответствует 2 ложкам порошка без верха на 1 каплю жидкости.

Рабочее время материала не менее 30 минут.

Время твердения материала не менее 1 часа и не более 72 часов.

Перед пломбированием определить длину каналов, чтобы избежать выхода пасты за пределы апекса. Полученную пасту ввести в подготовленный канал при помощи корневой иглы или каналонаполнителя.

Чтобы убедиться в том, что канал качественно запломбирован следует сделать рентгеновский снимок.

## ВНИМАНИЕ

- Приготовление пасты следует проводить в перчатках;
- Заполнять пастой только полностью подготовленный корневой канал;
- Остатки пасты со стенок зуба необходимо тщательно удалять.
- Возможна кратковременная болевая чувствительность при выведении пасты за апекс;
- Возможна сенсibilизация при контакте материала с кожей;

## ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок в банке — 20г;  
Жидкость во флаконе — 10 мл;  
Инструкция по применению — 1 шт;  
Ложка для дозирования — 1 шт;  
Блок для замешивания — 1 шт.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить при температуре от +4°C до +25°C в плотно закрытой таре.  
Материал «Эндовит» в упакованном виде транспортируют всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  
Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения 3 (ЖЗ).

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала «Эндовит» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы после использования «Эндовит» в виде остатков порошка, жидкости, пустой тары утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класс А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и,  
тел. (473) 279-76-82, 279-78-87, факс (473) 237-61-06  
[WWW.CELIT.RU](http://WWW.CELIT.RU)

Подготовил:

Инженер-технолог  /Е.В. Попова/

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 2 (два) листов

Генеральный директор Андреева Л.Г.

