



«Утверждаю»

Ген. директор ООО «Целит»

Блажко В.А.

«26» декабря 2011 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖИДКОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И
ЧАСТИЧНОГО РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ НА ОСНОВЕ
ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 3%
«БИОСЕНТ - Ц»
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 9391- 047-10614163-2011**

Назначение изделия:

«Биосепт-Ц» предназначен для использования в стоматологических клиниках в процессе подготовки корневых каналов зубов перед пломбированием. С целью антисептической обработки корневых каналов зубов и частичного их расширения.

Состав

Состав: натрия гипохлорит 3%, вода дистиллированная, стабилизатор.

Технические характеристики:

Представляет собой прозрачную с зеленоватым оттенком жидкость с характерным запахом хлора. Раствор едок. Подготовка перед применением не требуется.

Порядок работы

Смочить в растворе турунду и ввести в канал. Операцию повторить 4 раза до получения чистой турунды. Для промывания канала набрать в шприц необходимое количество раствора. При использовании специальных канюль провести орошение канала. Не промывать под давлением во избежание попадания за апекс. Раствор едок и непригоден к применению в ранах и инфицированных областях мягких тканей, а также при недоразвитой верхушке корня зуба.

Рекомендуется проводить химическую обработку канала, совмещая использование 3% водного раствора гипохлорита натрия и раствора (геля) на основе ЭДТА.

Комплект поставки:

«Биосепт-Ц» выпускается во флаконах из темного стекла по $25 \pm 0,5$ мл.
или во флаконах из ПЭТ по 250 ± 5 мл.

Условия хранения:

Хранить в прохладном, защищенном от света месте при температуре от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Срок годности: 1 год

Подготовил:

Вед. инженер-технолог Никифорова Ю.С.

