



«Утверждаю»

ген. директор ООО «Целит»

Блажко В.А.

21.05.2010 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТЕРИАЛ «СУПРАДЕНТ-К» ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

ТУ 9391-009-10614163-99

Назначение изделия:

«Супрадент-К»-материал для временного пломбирования корневых каналов с ионами серебра в шприц-тюбике по 2,5 г.

Предназначен для временной obturation корневых каналов с целью антисептического воздействия на систему корневых каналов.

Состав

Состоит из гидроокиси кальция, сульфата бария, метилцеллюлозы, ионов серебра, фторсодержащих и модифицирующих добавок.

Технические характеристики:

Представляет собой готовую к употреблению пасту без запаха, средней вязкости, рентгеноконтрастную, белого цвета.

Порядок работы

После механической и медикаментозной обработки корневого канала с помощью канюли ввести пасту в корневой канал. Полость закрыть временным пломбировочным материалом. Во второе посещение (через 3-5 дней) пасту удалить из канала. В зависимости от клинической ситуации провести повторное пломбирование или окончательное, постоянным пломбировочным материалом.

Комплект поставки:

«Супрадент-К» выпускается в шприц-тюбике по 2,5 г.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от + 4°C до +25 °C в плотно закрытом шприце.

Подготовил:

Вед. инженер-технолог Никифорова Ю.С.



«Утверждаю»

ген. директор ООО «Целит»

Блажко В.А.

«25» октября 2010 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ НА ОСНОВЕ ГИДРООКСИ КАЛЬЦИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ «СУПРАДЕНТ» В ШПРИЦ-ТЮБИКЕ ТУ 9391-009-10614163-99

Назначение изделия:

«Супрадент», - материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция рентгеноконтрастный в шприц-тюбике.

Предназначен для использования в качестве подкладочного материала под постоянные пломбы при лечении глубокого кариеса.

Состав

Состоит из гидроокиси кальция, сульфата бария, метилцеллюлозы, фторсодержащих и модифицирующих добавок.

Технические характеристики:

Представляет собой готовую к употреблению рентгеноконтрастную пасту белого цвета на основе гидроокиси кальция. Размер частиц не более 50 мкм, Время твердения паст при толщине слоя 0,5 мм не более 30 минут.

Порядок работы

После механической и медикаментозной обработки полости пасту «Супрадент» внести точно на дно просушенной полости при помощи гладилки равномерным слоем 0,1-0,2 мм. Затем струей сжатого воздуха просушить материал в течение 30 секунд. После чего наложить стеклоиономерный цемент или другой пломбировочный материал.

Комплект поставки:

«Супрадент» выпускается в шприцах по 7 г.

Условия хранения:

Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +4°C до +25 °C в плотно закрытом шприце.

Подготовил:

Вед. инженер-технолог Никифорова Ю.С.