



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот
«16» сентября 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Буфера трис-НСI с гепарином

НАЗНАЧЕНИЕ

Буфер трис-НСI с гепарином предназначен для приготовления разведений при определении концентрации антитромбина набором реагентов «ХромоТех-Антитромбин».

ФАСОВКА

1. Буфер трис-НСI с гепарином, 3,5 мл – 1 флакон.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАГЕНТА

Буфер трис-НСI с гепарином представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, рН $8,25 \pm 0,05$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения реагента – класс 2а (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 4н от 06.06.2012 г.).

Реагент в используемых концентрациях не токсичен.

При работе с реагентом следует соблюдать ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».

При работе с реагентом следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирусы гепатитов или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАГЕНТЫ

- перчатки медицинские диагностические одноразовые;
- набор реагентов «ХромоТех-Антитромбин» (ООО фирма «Технология-Стандарт»).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Кровь для исследования забирают из локтевой вены в пластиковую пробирку, содержащую 2-3,8 % раствор натрия лимоннокислого трёхзамещенного (цитрата натрия), соотношение объемов крови и цитрата натрия - 9:1. Возможно использование вакуумных систем для забора крови, содержащих цитрат натрия (3,2-3,8 %). Кровь центрифугируют при 1200-1600 g в течение 15 мин. В результате получают бедную тромбоцитами плазму, которую переносят в другую пробирку, где хранят до проведения исследования.

Центрифугирование должно проводиться непосредственно после взятия крови, а отбор плазмы на исследование - сразу же после центрифугирования. Не допускается анализ плазмы крови, имеющей сгустки, гемолиз и полученной более 2 ч назад, а также замороженной плазмы крови.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТА И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТА К РАБОТЕ

Буфером трис-HCl с гепарином готов к использованию и не требует дополнительных разведений.

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Методика использования раствора буфера трис-HCl с гепарином указана в Инструкции к набору реагентов «ХромоТех-Антитромбин».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТА

Хранение реагента должно проводиться при температуре 2-8 °C в течение всего срока годности (18 мес.). Допускается транспортировка при температуре до +25 °C в течение 30 сут. Замораживание не допускается.

Не следует смешивать рабочие реагенты разных серий.


Медицинское изделие, пришедшее в негодность, в том числе в связи с истечением срока годности, подлежит утилизации как медицинские отходы класса А (СанПиН 2.1.7.2790-10).

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора. Любые отклонения от рекомендованных процедур проведения анализа и приготовления реагентов могут привести к получению неверных результатов исследования.

По вопросам, касающимся качества Буфера трис-НСІ с гепарином, следует обращаться в
О фирму «Технология-Стандарт» по адресу: 656037, г. Барнаул, а/я 1351; тел.: (3852) 27-13-
22-99-37, 22-99-38, 22-99-39; e-mail: mail@tehnologia-standart.ru

Директор ООО фирмы


«Технология-Стандарт» д.м.н., проф.

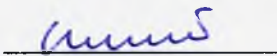

А.П. Момот

Зам. директора ООО фирмы

«Технология-Стандарт» д.м.н., доц.

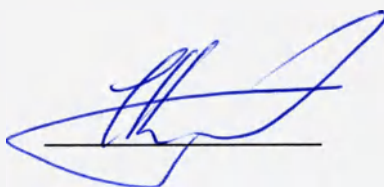

И.И. Шахматов

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «ВЫМПЕЛ-МЕДЦЕНТР»

«__» _____ 2015 г.




Ю.Н. Егоров

26 СЕН 2015

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 3 ЛИСТОВ
«23» СЕН 2015 год

Ген. Директор
ООО «ВЫМПЕЛ – МЕДЦЕНТР»

Ю.Н. Егоров

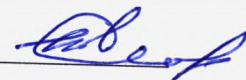

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3/марта листов
Руководитель Директор
А.П. Мещеряков
16 марта 20 15 г.

