

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТМЕД»
111524, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,
УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. I КОМН.27
Тел: +7 (495) 234-57-31
E-mail: andrey@int-med.ru URL: www.int-med.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИНТМЕД»

Сюй Чжаоцзюнь

« 28 » декабря 2023 г.



ОБЩИЙ ВИД ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ланцет стерильный однократного применения автоматический

Производитель: Hebei Xinle Sci&Tech Co., Ltd. (Хебей Синло Сайн&Тех Ко. Лтд.), Китайская Народная Республика

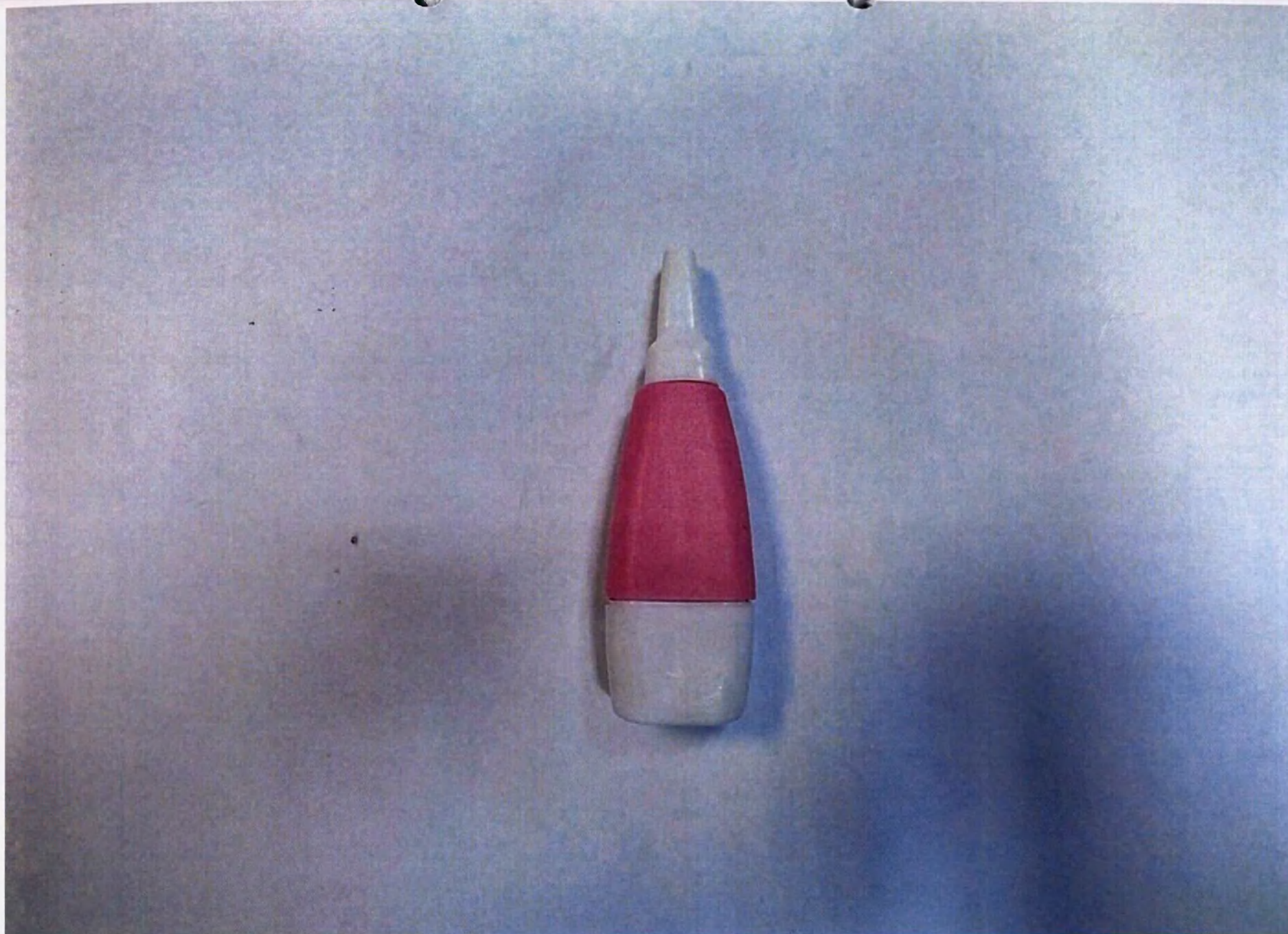


Фото 1 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 17G, глубина прокола 1.2 мм

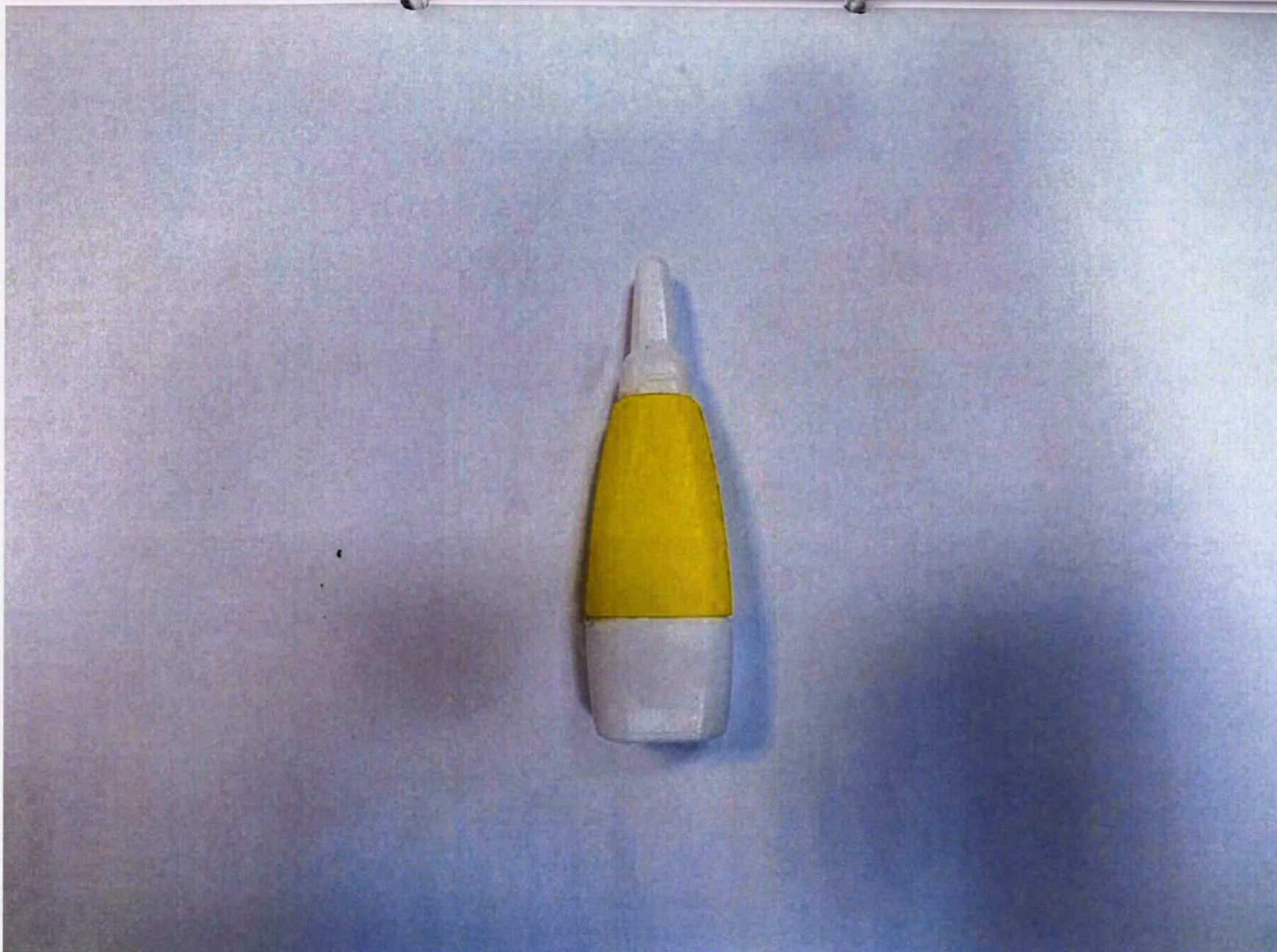


Фото 2 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 17G, глубина прокола 2.0 мм

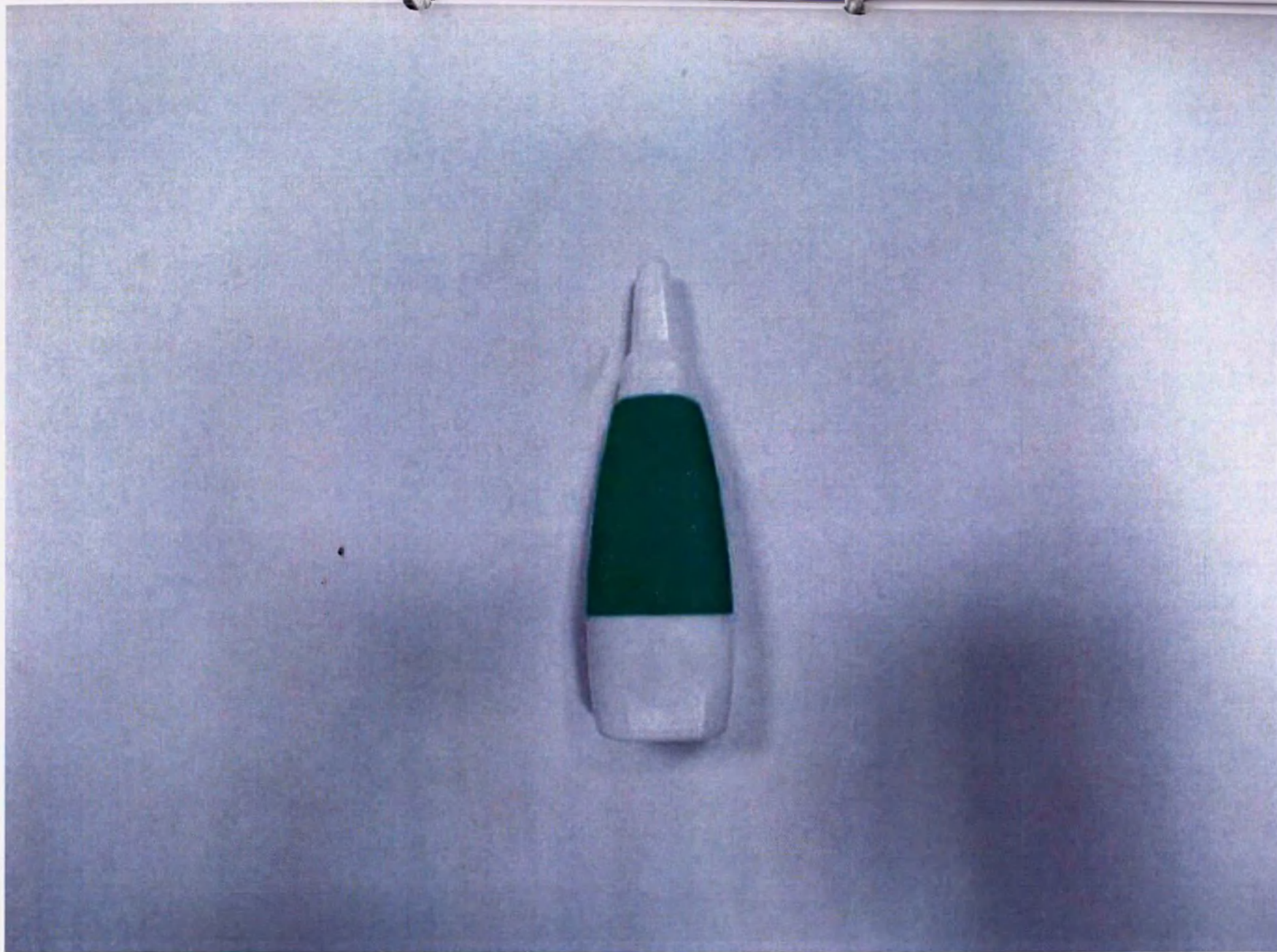


Фото 3 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 18G, глубина прокола 1.8 мм

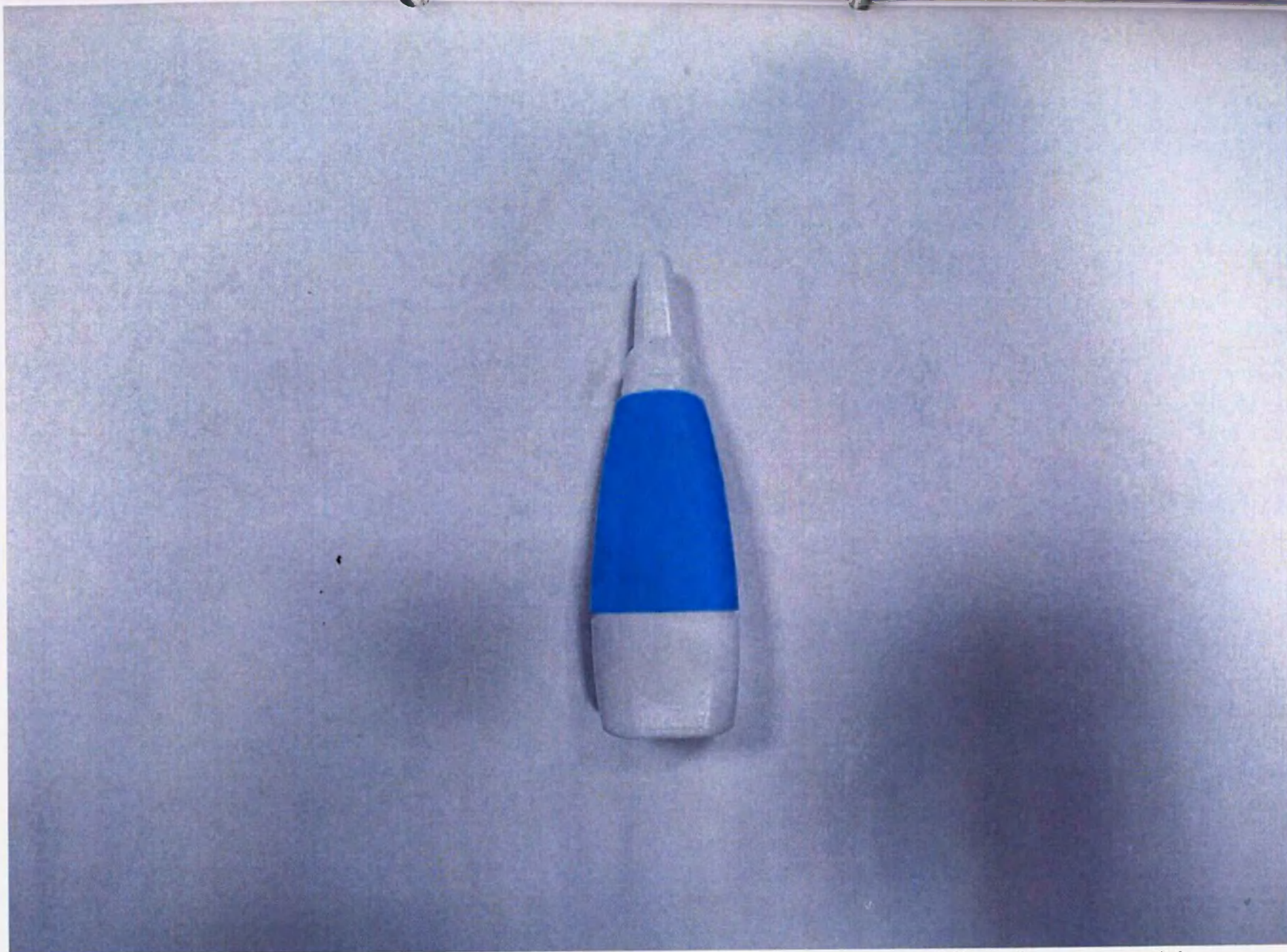


Фото 4 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 21G, глубина прокола 2.0 мм



Фото - 5 Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 18G, глубина прокола 1.8 мм



Фото 6 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 21G, глубина прокола 1.8 мм

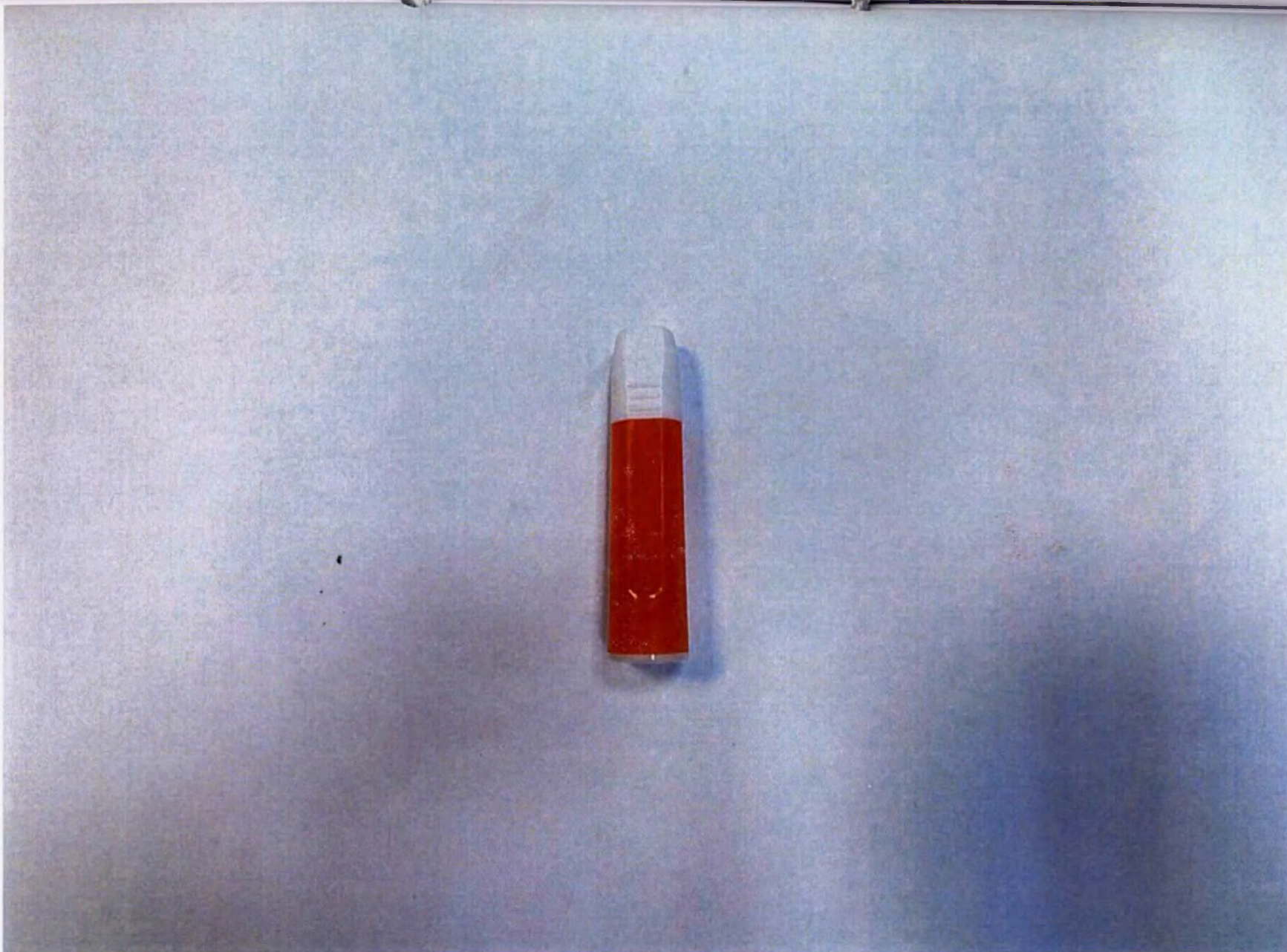


Фото - 7 Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 21G, глубина прокола 2.0 мм



Фото 8 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 21G, глубина прокола 2.2 мм



Фото 9 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 21G, глубина прокола 2.4 мм



Фото 10 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 23G, глубина прокола 1.8 мм



Фото 11 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 26G, глубина прокола 1.8 мм

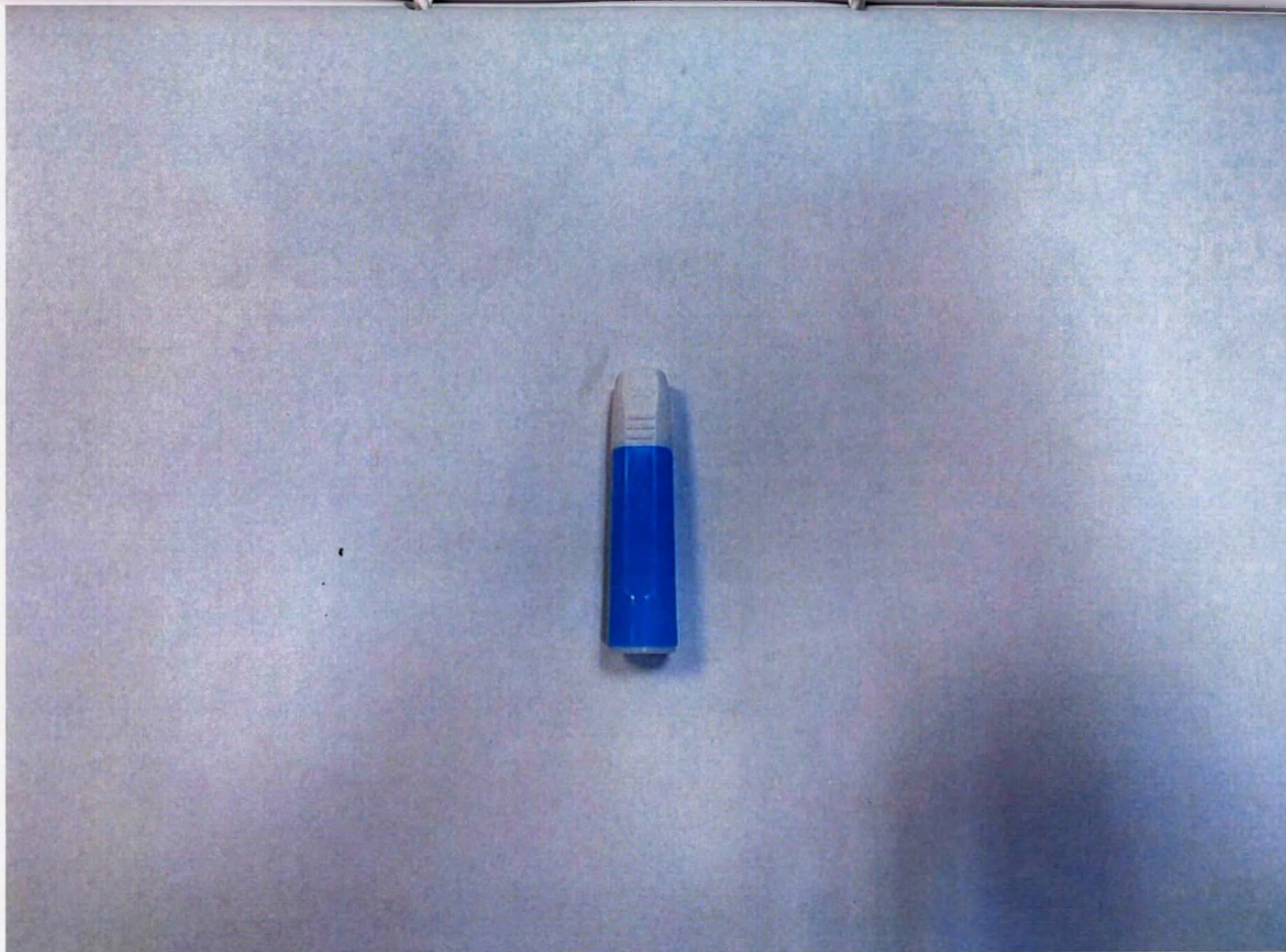


Фото 12 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 28G, глубина прокола 1.8 мм

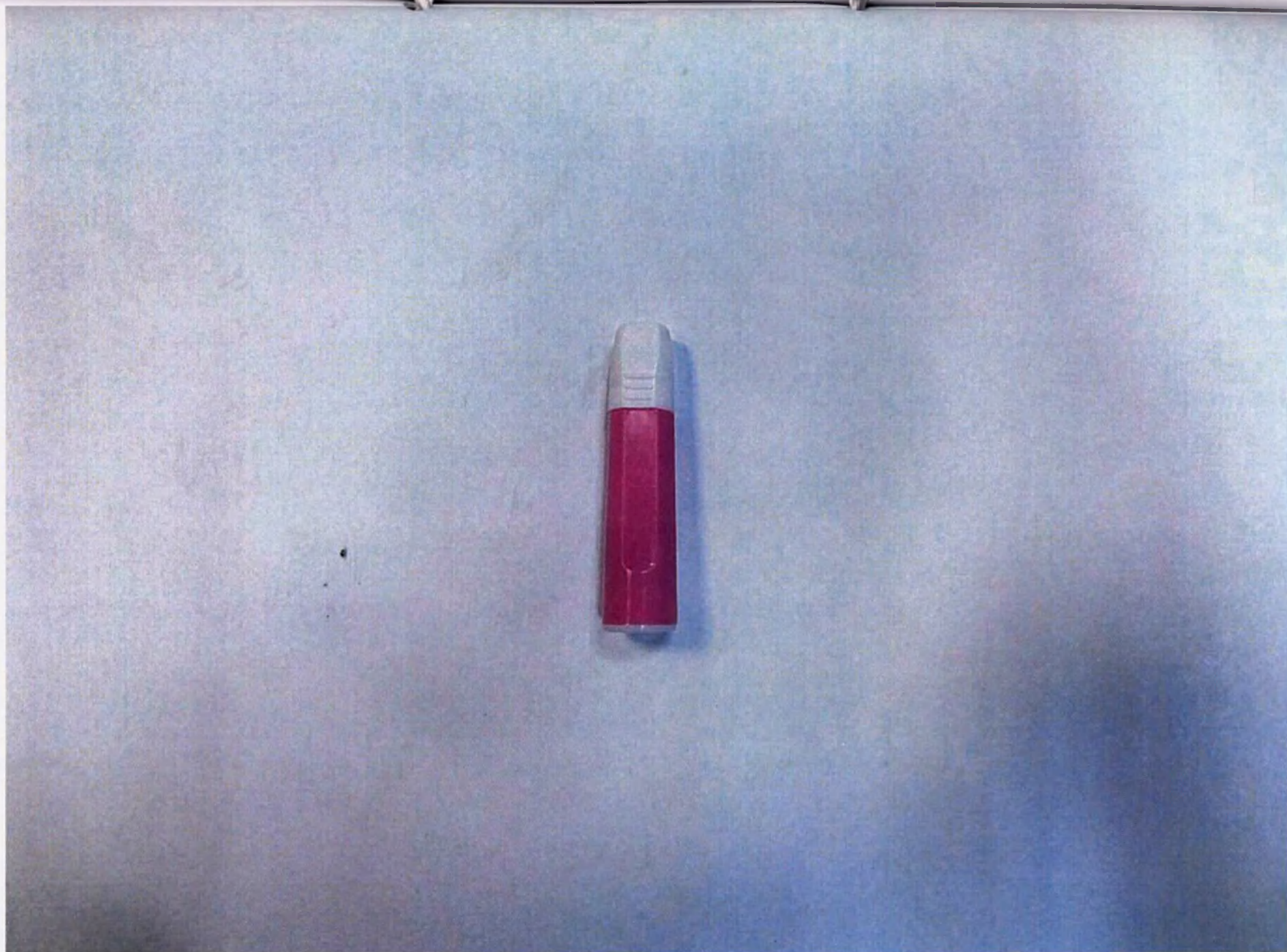


Фото 13 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 30G, глубина прокола 1.8 мм



Фото 14 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 26G, с регулируемой глубиной прокола 1.2-2.4 мм



Фото 15 - Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 28G, с регулируемой глубиной прокола 1.2-2.4 мм



Фото 16 – Групповая упаковка (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 17G, глубина прокола 1.2 мм»)



Фото 17 – Групповая упаковка (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 18G, глубина прокола 1.8 мм»)



Фото 18 – Групповая упаковка (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 26G, с регулируемой глубиной прокола 1.2-2.4 мм»)

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ УПАКОВОК



Макет маркировки групповой упаковки (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 17G, глубина прокола 1.2 мм»)



Hebei Xinle Sci&Tech Co., Ltd

No. 2, Xingye Street, Xinle city, 050700 Shijiazhuang city,

Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Тел.: + 86 0311 88581771; hbxinle005@hbxinle.net

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ:

ООО «ИНТМЕД», 111524, РОССИЯ, Г. Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,

УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д.1, СТР.12, ПОМЕЩ. I КОМН.27

Тел.: +7 (495) 234-57-31; andrey@int-med.ru; www.int-med.ru

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ ОТ _____.г.



Ланцет стерильный однократного применения автоматический



50

Raicare

M E D I C A L

Ланцет стерильный
однократного применения
автоматический




Назначение медицинского изделия: предназначен для осуществления контролируемого прокола/надреза кожи с целью взятия образца капиллярной крови.


Инструкция по применению:



Шаг 1: Открутить защитный колпачок.

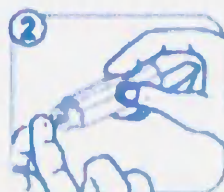

Шаг 2: Плотно приложить изделие к месту прокола и нажать на ланцет для взятия образца.

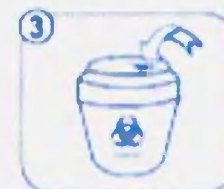

Шаг 3: Утилизировать в соответствующий контейнер для отходов.

Меры предосторожности:

- Изделие должно быть использовано в течение указанного срока годности.
- Не использовать, если защитный колпачок сломан.
- Все изделия предназначены только для одноразового использования.
- Использованные изделия должны быть собраны в контейнер для утилизации с указателем для надлежащей обработки.

Вариант исполнения:

с лезвием 17G, глубина прокола 1.2 мм



/ Код партии:

02638001



/ Дата изготовления:

02.12.2023



/ Использовать до:

01.12.2028



/ Номер по каталогу:

XLI-1712

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО




H



STERILE R

CE 0123



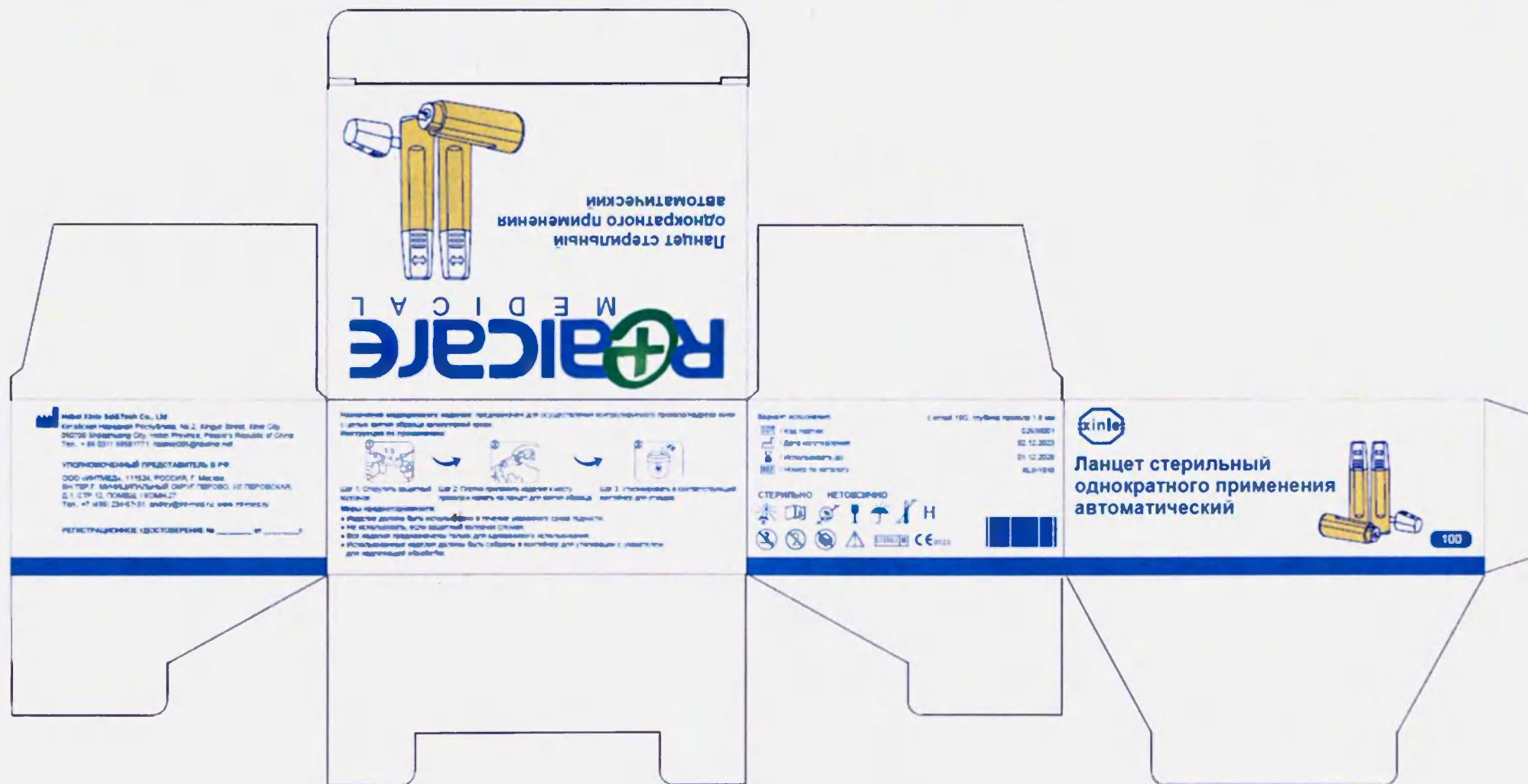

Макет маркировки групповой упаковки (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 18G, глубина прокола 1.8 мм»)



Hebei Xinle Sci&Tech Co., Ltd

No. 2, Xingye Street, Xinle city, 050700 Shijiazhuang city,

Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Тел.: + 86 0311 88581771; hbxinle005@hbxinle.net

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ:

ООО «ИНТМЕД», 111524, РОССИЯ, Г. Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,


УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д.1, СТР.12, ПОМЕЩ. I КОМН.27

Тел.: +7 (495) 234-57-31; andrey@int-med.ru; www.int-med.ru

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ ОТ _____ Г.



Ланцет стерильный однократного применения автоматический

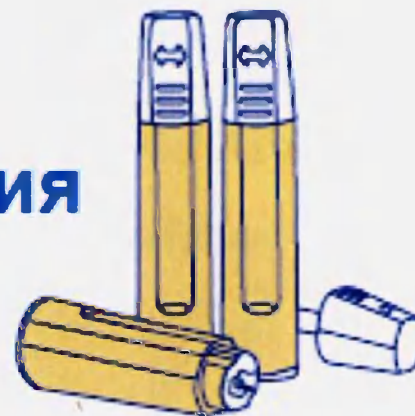


100

R+care


M E D I C A L

Ланцет стерильный
однократного применения
автоматический

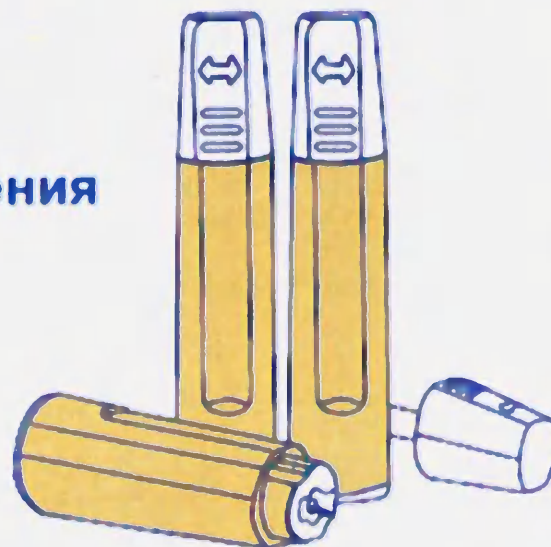


Назначение медицинского изделия: предназначен для осуществления контролируемого прокола/надреза кожи с целью взятия образца капиллярной крови.


Инструкция по применению:

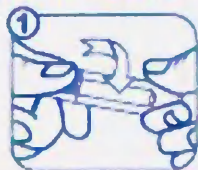

Шаг 1: Открутить защитный колпачок.

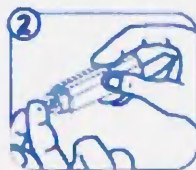

Шаг 2: Плотно приложить изделие к месту прокола и нажать на ланцет для взятия образца.

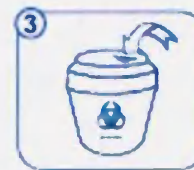

Шаг 3: Утилизировать в соответствующий контейнер для отходов.

Меры предосторожности:

- Изделие должно быть использовано в течение указанного срока годности.
- Не использовать, если защитный колпачок сломан.
- Все изделия предназначены только для одноразового использования.
- Использованные изделия должны быть собраны в контейнер для утилизации с указателем для надлежащей обработки.

Вариант исполнения:

с иглой 18G, глубина прокола 1.8 мм



/ Код партии:

02638001



/ Дата изготовления:

02.12.2023



/ Использовать до:

01.12.2028



/ Номер по каталогу:

XLII-1818

СТЕРИЛЬНО

НЕТОКСИЧНО




H



STERILE R

CE 0123

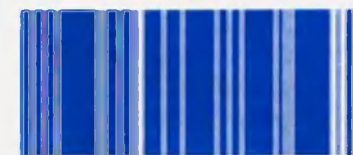



Hebei Xinle Sci&Tech Co., Ltd

No. 2, Xingye Street, Xinle city, 050700 Shijiazhuang city,

Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Тел.: + 86 0311 88581771; hbxinle005@hbxinle.net

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ:

ООО «ИНТМЕД», 111524, РОССИЯ, Г. Москва,

ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,


УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д.1, СТР.12, ПОМЕЩ. I КОМН.27

Тел.: +7 (495) 234-57-31; andrey@int-med.ru; www.int-med.ru

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ ОТ _____.г.



Ланцет стерильный однократного применения автоматический

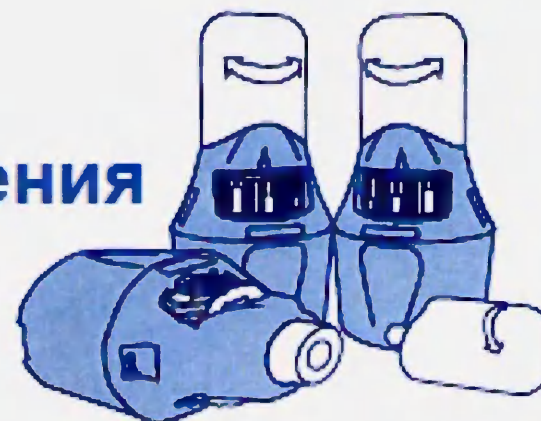

50

Raicare

M E D I C A L

Ланцет стерильный
однократного применения
автоматический



Назначение медицинского изделия: предназначен для осуществления контролируемого прокола/надреза кожи с целью взятия образца капиллярной крови.

Инструкция по применению:



Шаг 1: Открутить защитный колпачок.



Шаг 2: Плотно приложить изделие к месту прокола и нажать на ланцет для взятия образца.



Шаг 3: Утилизировать в соответствующий контейнер для отходов.

Меры предосторожности:

- Изделие должно быть использовано в течение указанного срока годности.
- Не использовать, если защитный колпачок сломан.
- Все изделия предназначены только для одноразового использования.
- Использованные изделия должны быть собраны в контейнер для утилизации с указателем для надлежащей обработки.

Вариант исполнения: с иглой 26G, регулируемая глубина прокола 1.2-2.4 мм

LOT / Код партии: 02638001

 / Дата изготовления: 02.12.2023

 / Использовать до: 01.12.2028

REF / Номер по каталогу: XLIII-26


СТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО





ЛАНЦЕТ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Вариант исполнения / Model	с лезвием 17G, глубина прокола 1.2 мм
Количество, шт. / Quantity, pcs	2000
Код партии / LOT	02630001
Дата изготовления / Manufacture date	02.12.2023
Использовать до / Expiry date	01.12.2028
Масса брутто, кг / Gross weight, kgs	12,0
Масса нетто, кг / Net weight, kgs	11,78
Номер по каталогу / REF	ХЛ-1713

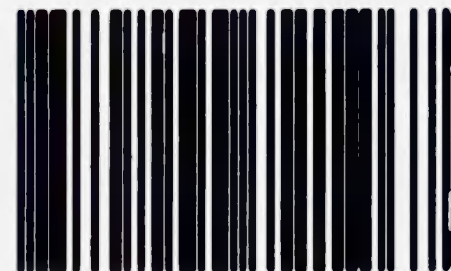

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Hebei Xinle Sci&Tech Co., Ltd

Китайская Народная Республика, No.2, Xingye Street, Xinle City, 050700 Shijiazhuang City, Hebei Province, People's Republic of China

Tel.: + 86 0311 88581771; hbxinle005@hbxinle.net

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РФ:

ООО «ИНТМЕД», 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,

УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д.1, СТР.12, ПОМЕЩ. 1 КОМН.27

Тел. +7 (495) 234-57-31, эл. почта: andrey@int-med.ru, www.int-med.ru

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ ОТ ____ . ____ . ____ Г.

MEAS.: 450 x 350 x 250 мм



Макет маркировки транспортной упаковки (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с лезвием 17G, глубина прокола 1.2 мм»)



Вариант исполнения / Model	с мощностью 100, глубина профиля 1,8 мм
Количество, шт. / Quantity, pcs	8000
Код партии / LOT	03630001
Дата изготовления / Manufacture date	03.12.2023
Использовать до / Expiry date	01.12.2026
Масса брутто, кг / Gross weight, kgs	11,3
Масса нетто, кг / Net weight, kgs	10,8
Номер по каталогу / REF	ХД-1010



MEAS.: 480 x 275 x 275 mm



 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Вариант исполнения / Model	с шланг 200, с регулируемой глубиной прохода 1.3-3.4 м
Количество, шт. / Quantity, pcs	2000
Код партии / LOT	03030001
Дата изготовления / Manufacture date	03.12.2023
Использовать до / Expiry date	01.12.2026
Масса брутто, кг / Gross weight, kgs	14,0
Масса нетто, кг / Net weight, kgs	13,0
Номер по каталогу / REF	ХМН-20



STERILE R         H CE 0123

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ ОТ ____ . ____ . ____ г.

MEAS.: 450 x 320 x 533 MM



Макет маркировки транспортной упаковки (например, для варианта исполнения «Ланцет стерильный однократного применения автоматический, с иглой 26G, с регулируемой глубиной прокола 1.2-2.4 мм»)

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 41 листа(ов).

Должность, ФИО _____

Генеральный директор

(подпись)

С.Ю. Чкалов

Место печати

«28» декабря 2023 года

