

**Руководство системного программиста
для
IP-программного обеспечения
(IP Nicelabel software - English version)**

2011г.

Оглавление

Инсталляция и активация	3
Минимальные системные требования:	3
Инсталляция программного обеспечения	3
Активация программного обеспечения	4
Установка Обновлений	4

Инсталляция и активация

Минимальные системные требования:

Для установки программы Вам необходимо следующее:

- компьютер на базе процессора Pentium с не менее, чем 128Мб свободной оперативной памяти
- 32- или 64-битная операционная система Windows 2000, XP 2003 и Wista
- 32-битная операционная система Windows 7
- жесткий диск со свободным пространством от 74 до 250 Мб (в зависимости от набора опций при установке)
- дисковод CD-R
- права администратора для установки программы на компьютер.

Инсталляция программного обеспечения

Когда Вы вставляете диск с программным обеспечением (ПО) в дисковод, автоматически запускается программа инсталляции/демонстрации.

Перед началом инсталляции закройте все работающие программы.

Для инсталляции нажмите кнопку Инсталлировать. В новом окне будут показаны доступные варианты ПО.

Вы можете выбрать необходимые компоненты для инсталляции:

- Полная инсталляция - установка ПО на всех возможных языках.
- Компактная инсталляция — установка минимального набора компонентов, необходимых для правильной работы ПО. Не будут установлены файлы-помощи и образцов.
- По выбору пользователя — позволяет Вам выбрать необходимые для Вас компоненты инсталляции.

Для продолжения установки сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку Далее
2. Выберите группу программ, которую Вы хотите установить.
3. Определите, где будут расположены ярлыки ПО
4. Нажмите кнопку Установка для завершения установки.
5. В меню Пуск появится новая группа программ ПО.

Установка драйвера принтера

Вы можете использовать ПО для дизайна и печати этикеток как на обычных офисных принтерах, так и на профессиональных принтерах. Если для печати Вы используете термо-принтер, Вам необходимо установить драйвер NiceDriver.

После установки NiceDriver сделайте следующее:

1. Выберите опцию Установить драйвер принтера
2. Нажмите кнопку Завершить
3. Откроется помощник установки
4. Выберите Ваш принтер из списка. Нажмите кнопку Далее
5. Выберите порт для соединения принтера и нажмите кнопку Завершить.

Активация программного обеспечения

Следующие инструкции для активации предназначены для пользовательских и сетевых версий.

Вам следует активировать ПО, если Вы планируете его использовать.

Существует несколько типов активации ПО:

- активация с помощью ключа
- сетевая активация
- персональная активация

Для активации с помощью ключа Вам следует:

1. выключить компьютер и отключить принтер.
2. соединить ключ с Вашим компьютером. Запустить ПО.
3. Нажать кнопку Менеджер лицензий
4. Выбрать Активация и нажать Далее
5. Выбрать Ключ и нажать Далее
6. Нажать Завершить и запустить рабочий режим.

Установка Обновлений

Вы можете обновить ПО следующими способами:

- Обновить ПО в пределах одной версии, например, с 5.0.0 до 5.1.0
- Обновить ПО со старой версии на самую новую, например, с 2.1.0. на 3.0.0
- Обновить издание ПО

Перед обновлением ПО, убедитесь, что Вы

- создали резервную копию имеющихся файлов
- не переместили существующую версию с рабочего стола Вашего компьютера
- проверили издание ПО, которое у Вас уже установлено.

Для обновления ПО:

1. Закройте ПО
2. Отключите антивирусную программу, установленную на Вашем компьютере
3. Установите новую версию ПО в ту папку, в которую уже установлена предыдущая версия
4. Следуйте указаниям.

Установка обновленного издания ПО:

Когда Вы планируете обновить издание ПО, Вы хотите установить более мощную версию, например обновить NiceLabel Express на NiceLabel Pro или NiceLabel Pro на NiceLabel Suite.

Для этого Вам следует:

- создать резервные копии имеющихся файлов
 - закрыть ПО
 - Не удалять уже установленное ПО
1. Вставьте диск в дисковод
 2. Установите новое издание на Ваш компьютер. Следуйте тем же инструкциям, как при первой инсталляции.
 3. Следуйте указаниям

Генеральный директор ООО «БиоЛайн»

Семенов А.В.



Дата: 20.12.2011

М.П.