

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ИМБИАН»

/С.А. Иванов/

« 01 » октября 2023 г.



Проект маркировки



**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов
коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале**

«COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

1. Образцы маркировки комплекта № 1

1.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 1

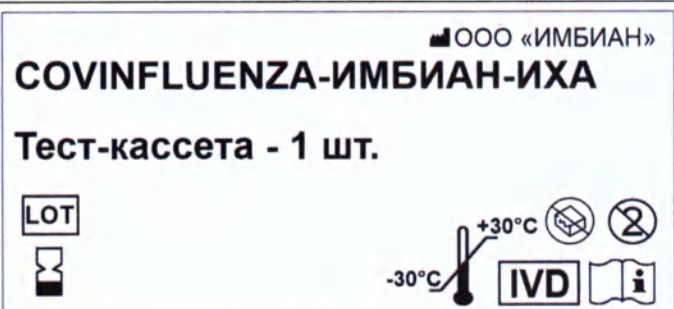
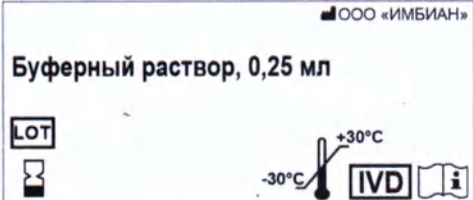
Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	
Буферный раствор	

1.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 1



2. Образцы маркировки комплекта № 2

2.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 2

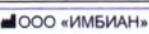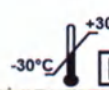Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	 COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета - 1 шт.    
Буферный раствор	 Буферный раствор, 0,25 мл    

2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 2


ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
ГРИПП или CORONA A/B VIRUS
 • Лабораторная точность • Результат за 1 минуту
1 ТЕСТ
2 в 1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-3927034-2023

РТУ №

REF iKR-004/1.1

Проверено клиническими испытаниями | Проверено в использовании

Сертифицирован Минздравом | Одобрено Росздравнадзором

СОСТАВ:

Тест-кассета 1 шт

Буферный раствор (0,25 мл) 1 шт

Таблетки (жид. МетилМед) (стерильный) ТУ 32.50.50-034-2008033-2020 (РТУ № 1331 2021/0079) 1 шт

Инструкция по применению 1 шт

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

ООО «ИМБИАН»
 Россия, 630554, Новосибирской области, г. Новосибирск,
 ул. Кедровый лес (станция), Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 247, к. 4,
 помеш. 5, тел.: +7(383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru


 4 610240 913686

LOT

3. Образцы маркировки комплекта № 3

3.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 3

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН» COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета - 1 шт. LOT IVD 30°C 30°C
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН» Буферный раствор, 0,25 мл - 20 пр. LOT IVD 30°C 30°C

3.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 3

COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

РУ №

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 0,25 мл
- Тампон-зонд Имбид стерильный
- Полемент
- Инструкция по применению

ТУ 32.50.50-034-28608133-2020 (РУ № РЗН 2021/15079)

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа А/В в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

20 шт.

20 пр.

20 шт.

1 шт.

1 шт.

REF IKR-004/20.3

Imbian

4 610240 913693

30°C

30°C

IVD

Σ

20

ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область, м.р.н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1


+7 (383) 209-34-54

www.imbian.ru

info@imbjan.ru

4. Образцы маркировки комплекта № 4

4.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 4

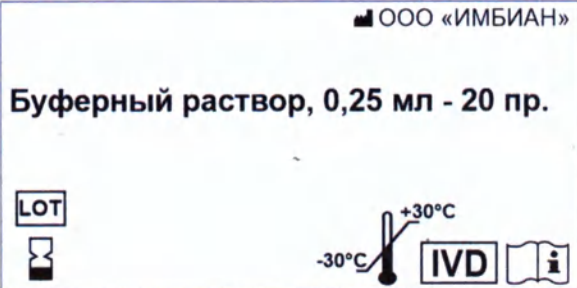Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	
Буферный раствор	

4.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 4

COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА
 Комплект № 4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа А/В в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

РУ №

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 0,25 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный

ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 (РУ № РЗН 2021/15079)

- Ложемент
- Инструкция по применению

20 шт.

20 пр.

20 шт.

1 шт.

1 шт.

LOT 231001

EXP 2023-10-01

EXP 2026-10-01

REF iKR-004/20.4

Imbian



4 610240 913709

ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

+7 (383) 209-34-54

www.imbian.ru

info@imbian.ru

5. Образцы маркировки комплекта № 5

5.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 5

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН» COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета - 1 шт. LOT IVD 30°C 30°C
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН» Буферный раствор, 0,25 мл - 25 фл. LOT IVD 30°C 30°C

5.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 5

COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа А/В в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-004-38271834-2023

РУ №

- Тест-кассета 25 шт.
- Буферный раствор, 0,25 мл 25 фл.
- Тампон-зонд Микробед стерильный 25 шт.
- ТУ 32.60.60-034-28608133-2020 (РУ № РЗН 2021/16078)
- Инструкция по применению 1 шт.

LOT

REF IKR-004/25.5

Imbian

4610240 913723

30°C

30°C

IVD

Σ 25

ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область, м.р.-н Новосибирский, с.п. Барьяшевский сельсовет, с. Барьяшево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

+7 (383) 209-34-64

www.imbian.ru

info@imbien.ru

6. Образцы маркировки комплекта № 6

6.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 6

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН» COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета - 1 шт. LOT IVD +30°C -30°C
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН» Буферный раствор, 0,25 мл - 25 пр. LOT IVD +30°C -30°C

6.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 6

COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

РУ №

- Тест-кассета
- Буферный раствор 0,25 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный
- Почемент
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS CoV 2 и вируса гриппа А/В в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23.064.39271034.2023

25 шт

25 пр

25 шт

1 шт

1 шт

REF iKR-004/20.3

Imbian

4 610240 913747

ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1

+7 (383) 209-34-54

www.imbian.ru

info@imbian.ru



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист 06
Директор ООО «ИМБИАН»
С.А. Иванов
"0" 10 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО «ИМБИАН»

/С.А. Иванов/

2023 г.

Фотографические изображения общего вида

**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов
коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале
«COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023**

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция по применению распространяется на Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023 (далее – Экспресс-тест «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»).

Сокращенное наименование COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА
Назначение изделия
Экспресс-тест «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» предназначен для качественного выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 и антигенов гриппа типов А (включая подтипы H1N1 и H3N2) и В в мазках из носоглотки, ротоглотки и образцах слюны у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания методом иммунохроматографического анализа (ИХА).

Предназначен для диагностики in vitro при профессиональном применении с целью первичной диагностики и дифференциации коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа типов А и В.

Популяционно-демографические особенности
Применение экспресс-теста не имеет возрастных и демографических ограничений.

Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020

Прокладывает: 000 «Имбиан»
Хранить следует при t от -40 до +40°C, влажность воздуха не более 50%.
Транспортировать при t от -40 до +50°C, влажность воздуха не более 100%.
РУ № РЗН 2021/15079 от 26.10.2021 г.

Экспресс-тест (иммунохроматографический), типовой алгоритм
Экспресс-тест (ИХА)
Тампон-зонд (ИХА)
Длина зонда 100 мм
Дата изготовления: 10.10.2021
Гарант: 09.10.2020

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая инструкция по применению распространяется на Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023 (далее – Экспресс-тест «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»).

Сокращенное наименование COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА
Назначение изделия
Экспресс-тест «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» предназначен для качественного выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 и антигенов гриппа типов А (включая подтипы H1N1 и H3N2) и В в мазках из носоглотки, ротоглотки и образцах слюны у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания методом иммунохроматографического анализа (ИХА).

Предназначен для диагностики in vitro при профессиональном применении с целью первичной диагностики и дифференциации коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа типов А и В.

Популяционно-демографические особенности
Применение экспресс-теста не имеет возрастных и демографических ограничений.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

РУ №

СОСТАВ:

Тест-кассета 1 шт.

Буферный раствор, 0,25 мл 1 фл.

Тампон-зонд МиниМед стерильный ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 (РУ № РЗН 2021/15079) 1 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °C не более 10 суток.

КОМПЛЕКТ №1

LOT 231001

2023-10-01

2026-10-01


Место под флакон


Пройдены клинические испытания

Прост в использовании

Сверхчувствительный

Одобрено Росздравнадзором

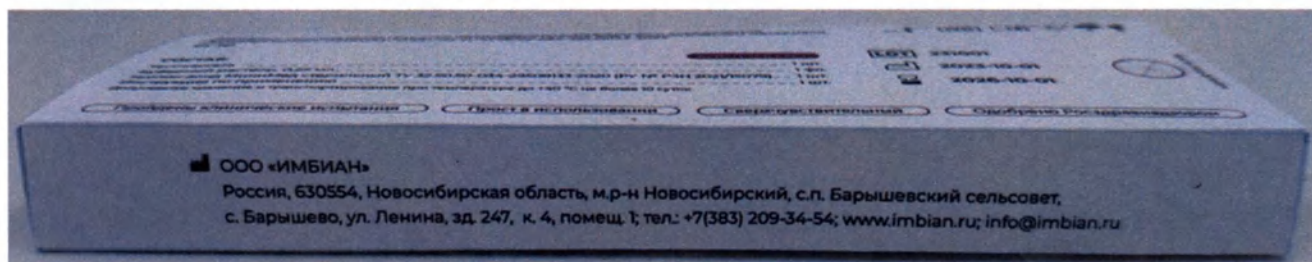

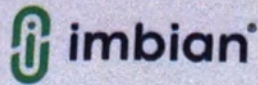

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

ГРИПП или CORONA
A/B VIRUS

• Лабораторная точность • Результат от 1 минуты

1 ТЕСТ

2 В 1

 ООО «ИМБИАН»
COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА
 Тест-кассета - 1 шт.
 LOT 231001
 2026-10-01

 -30°C 37°C
 IVD
ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа A/B в биологическом материале «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023 (далее - Экспресс-тест «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»).

Сокращенное наименование
COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА

Назначение изделия

Экспресс-тест «COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА» предназначен для качественного выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 и антигенов гриппа типов А (включая подтипы H1N1 и H3N2) и В в мазках из носоглотки, ротоглотки и образцах слюны у лиц с клинической симптоматикой респираторного заболевания методом иммунохроматографического анализа (ИХА).

Предназначен для диагностики in vitro при профессиональном применении с целью первичной диагностики и дифференциации коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа типов А и В.

Популяционно-демографические особенности

Применение экспресс-теста не имеет популяционных и демографических особенностей.


 Код
 10122021
 1800002025

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00


 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00


 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 00

 Тип
 01
 02
 03

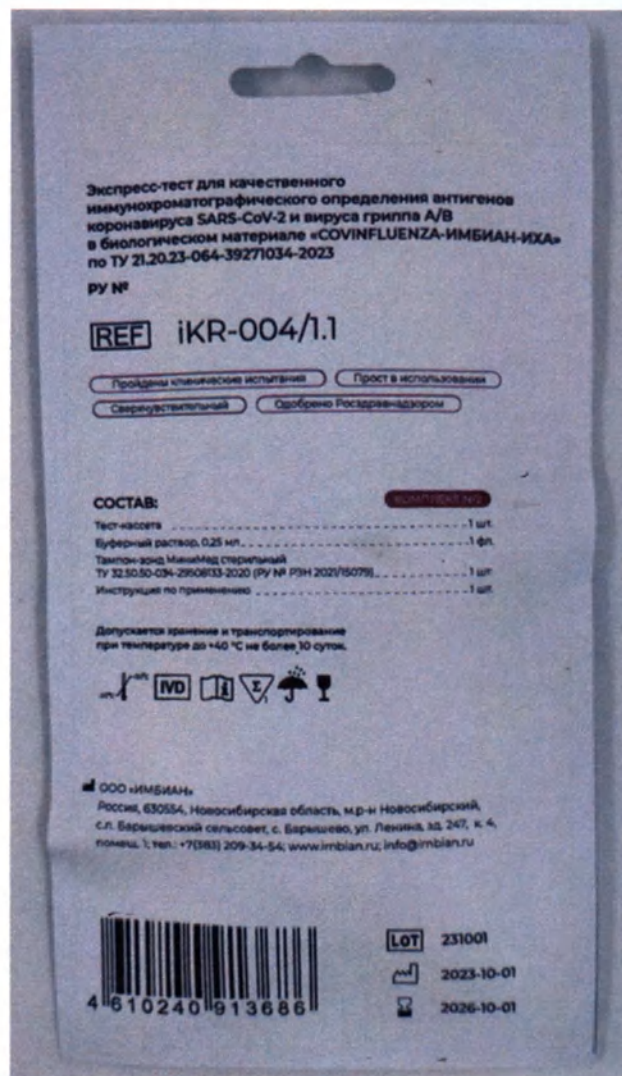



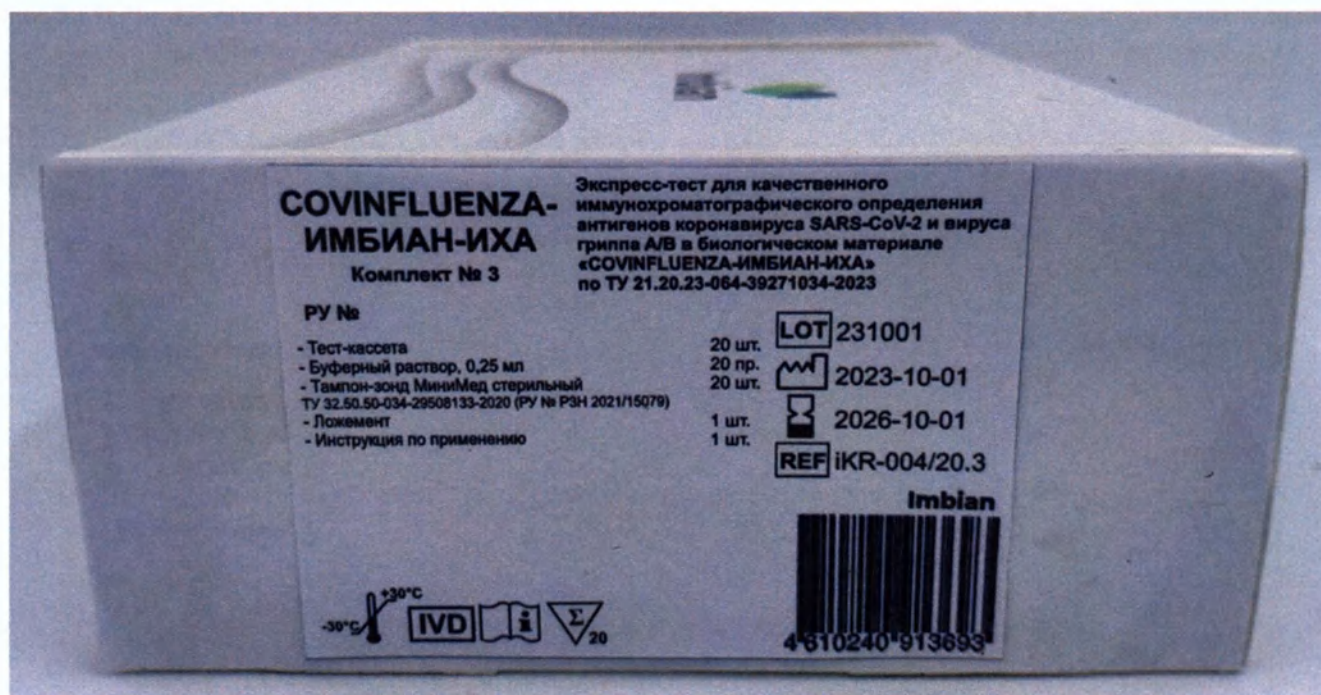



COVINFLUENZA- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

РУ №

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 0,25 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 (РУ № РЭН 2021/15079)
- Ложемент
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса
гриппа А/В в биологическом материале
«COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

20 шт.

20 пр.

20 шт.

1 шт.

1 шт.


LOT 231001



2023-10-01

2026-10-01

REF IKR-004/20.4

Imbian

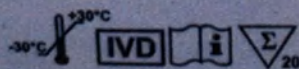

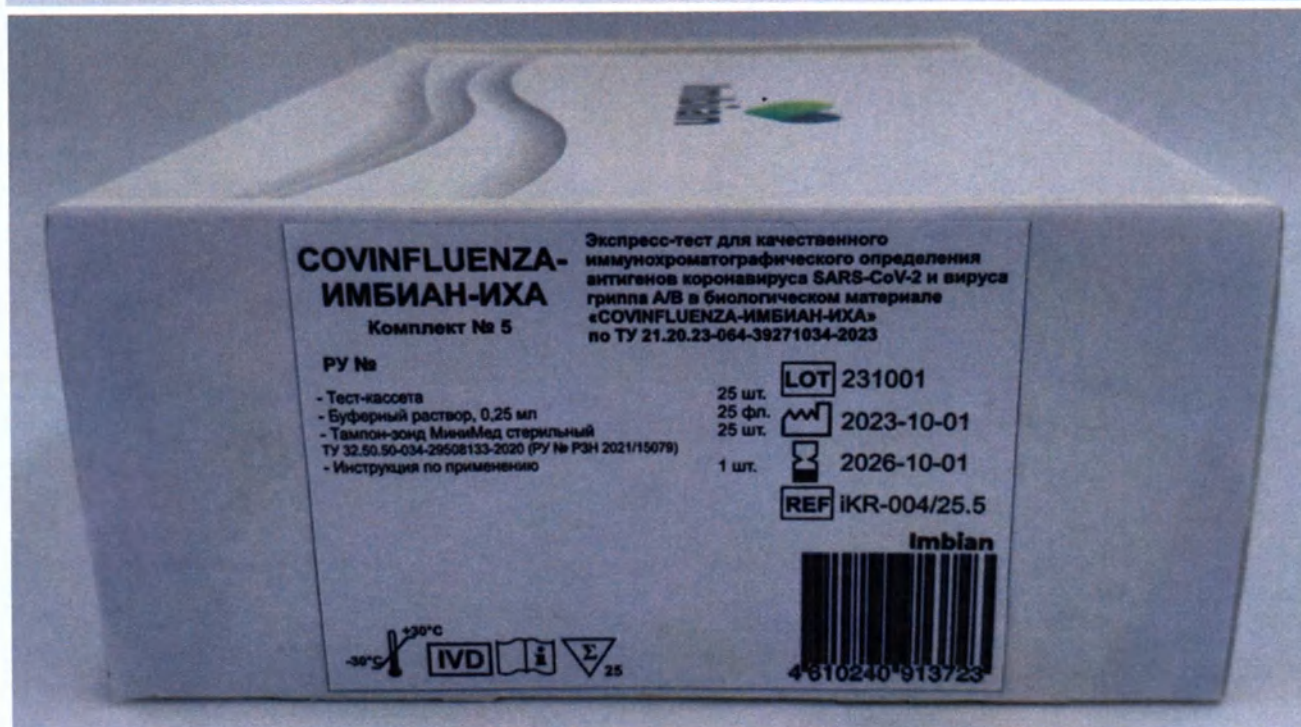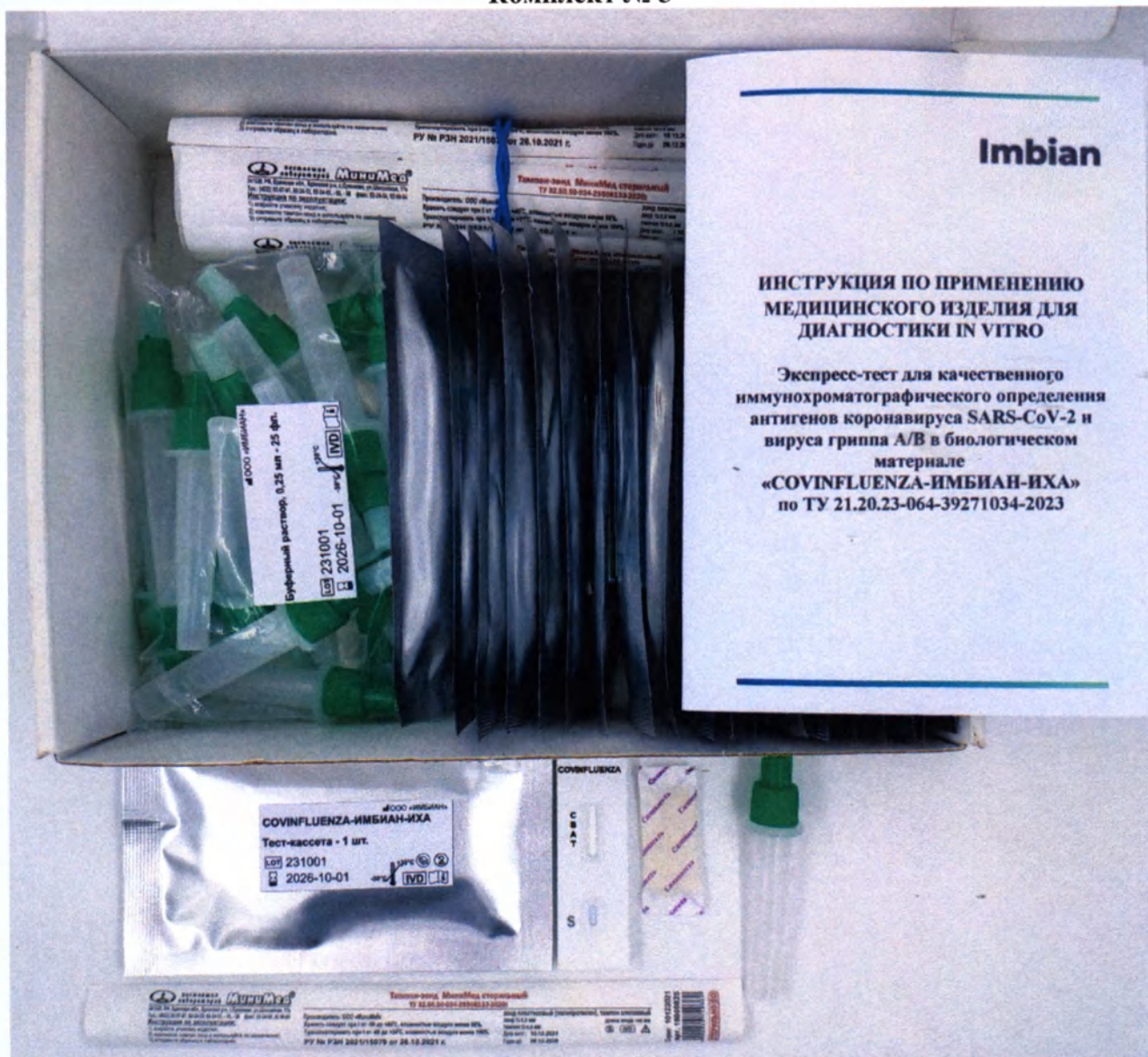



COVINFLUENZA- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

РУ №

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 0,25 мл
- Тампон-зонд МиниМед стерильный
ТУ 32.50.50-034-29508133-2020 (РУ № РЗН 2021/15079)
- Ложемент
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса
гриппа А/В в биологическом материале
«COVINFLUENZA-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-064-39271034-2023

25 шт.

25 пр.

25 шт.

1 шт.

1 шт.


LOT 231001

2023-10-01

2026-10-01

REF IKR-004/20.3

Imbian

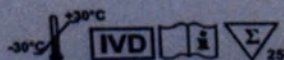



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 16

Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов

21 " 40 . 2023 г.