



Производитель:
ЗАО Танета /Taneta/
ул.Приену 24 а,г.Бирштонас
Тел.: (8 319)65630,факс (8 319)65633

Дистрибьютор на территории РФ:

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
«Системы реабилитации»
443013, г. Самара, ул. Московское шоссе, 4,

Стул ортопедический
для детей- инвалидов с санитарным оснащением,
модель 104202, 104203

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Назначение.....	3
Описание и эксплуатация.....	3
Технические параметры.....	4
Уход за изделием.....	5
Требования безопасности.....	5
Гарантия изготовителя.....	6
Соответствие стандарту.....	7

Стул реабилитационный для детей-инвалидов соответствует требованиям Директивы Совета Европейского Сообщества о медицинских приборах 93/42 ЕЭС. Пригоден для использования.

Проверено: _____
(имя, фамилия, подпись)

М. П.

(дата производства)

Дата продажи: _____ SN _____
(номер серии)

М. П.

Продавец _____

(имя, фамилия, подпись)

5. Зафиксировать ребенка с помощью ремня для фиксации корпуса (9).
6. Установить и зафиксировать абдуктор (6).
7. Установить соответствующую высоту и угол наклона опоры для ног (4). Стопы фиксировать на опоре для ног с помощью двух застежек велькро.
8. Закрепить столик (5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Общая высота (мм)	Ширина сиденья (мм)	Глубина сиденья (мм)	Максимальная грузоподъемность (кг)
104202	850	330	300÷350	40
104203	1200	380	350÷400	60

Составные части стула:

- (1) подголовник
- (2)- спинка стула
- (3)- сиденье стула
- (4)- опора для ног
- (5)- столик
- (6)- абдуктор
- (7)- колеса
- (8)- винты для регулировки
- (9)- ремни для фиксации
- (10)- ведро съемное с крышкой

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Мягкую часть стула сшитую из кордовой ткани рекомендуется стирать в теплой воде при температуре 30° C

сшитую из искусственной кожи чистить с применением любых средств разрешенных для применения в России.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдать условия эксплуатации.

Соблюдать максимальную нагрузку для устройства данного типа.

Пользоваться изделием только в помещении при наблюдении квалифицированного лица.

Все регулируемые элементы устанавливать вручную, убедившись в надежности их крепления.

Запрещается пользоваться стулом с неисправными или недостающими элементами.

Не использовать изделие в иных целях, не соответствующих его назначению.

Не оставлять пользователя, сидящего на стуле, без присмотра и в незащищенном от солнца месте.

Не использовать стул на неровной и наклонной плоскостях.

Не ставить стул вблизи от источников возгорания.

Запрещается вносить изменения в конструкцию.

Соблюдать требования данной инструкции.

ЗАО «Танета» предоставляет для изделия гарантию 12 месяцев со дня продажи. В случае нарушения требований настоящей инструкции, изготовитель за качество изделия не отвечает и претензий не принимает.

Стул ортопедический для детей-инвалидов с санитарным оснащением, модель 104202, 104203 предназначен для детей от 100 см до 140 см роста. Предназначен для использования в помещении. Используется в детских учреждениях, санаториях, а также дома. Стул изготавливается 2 размеров.

ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Стул имеет элементы регулирования, которые позволяют приспособить их к каждому ребенку. Съемное санитарное оснащение избавляет от необходимости переносить малыша из кресла в туалетную комнату.

Стул снабжен опорой для головы и крепёжными ремнями и для фиксации ребенка.

Санитарное оснащение крепится к нижней части сиденья и легко снимается.

Материал, которым обтянуты сиденье и спинка, легко чистить и дезинфицировать.

Все регулировки выполняются с фиксацией принятого положения. Для подготовки стула к использованию действуем согласно рисунка в следующем порядке:

1. Заблокировать колеса педалью
2. Посадить ребенка на стул, убедившись заранее в соответствующей блокировке колес.