



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ GEL ETCHANT

Гель фиолетового цвета для кислотного протравливания фирмы Kerr содержит 37.5% фосфорной кислоты и обладает максимальной протравливающей эффективностью. Его превосходная вязкость позволяет ему оставаться строго в месте нанесения, но при этом он легко смывается.

Срок хранения:

3 года

Инструкции по применению:

1. Нанесите гель для кислотного протравливания фирмы Kerr* на поверхность эмали и дентина на 15 секунд.
2. Тщательно промойте водой в течение 15 секунд. Избегайте попадания геля в глаза, на мягкие ткани или кожу.
3. Высушите не содержащим масла воздухом, не пересушивая дентин. Не допускайте попадания слюны или крови на протравленную поверхность во время проведения адгезивных процедур.
4. Нанесите адгезив.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не прилагайте чрезмерных усилий на поршень шприца при нанесении кислоты, так как это может привести к выходу чрезмерного количества материала под большим давлением. При наличии ощущения сопротивления, смените насадку на новую и оцените подачу материала вне полости рта.

***Осторожно:** Содержит фосфорную кислоту. Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды. В случае попадания в глаза, обратитесь за консультацией к врачу. Не принимать внутрь.

Состав:

Компонент	Описание
H_3PO_4	Фосфорная кислота
H_2O	Вода
V3285	Синий краситель
Red33	Красный краситель

Cab-O-SilM5

Высокодисперсный диоксид кремния
Interwet 33 (AKZO)

Характерные особенности и преимущества

Особенности	Преимущества
• Превосходная вязкость • Не отслаивается от места нанесения • Яркий фиолетовый цвет • Полностью смывается без приложения усилий • Однородная консистенция, позволяющая наносить гель как непосредственно из шприца, так и с помощью кисточки	• Гель для кислотного протравливания фирмы Kerr остается в том месте, где Вы его нанесли • Простота нанесения и чистота рабочей области • Хорошо заметен • Простота применения • Позволяет использовать материал в соответствии с привычной для Вас методикой

