

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТД» БЕЛСПЕЦСТИЛЬ»

Чеботарёв А.М.

«30» мая 2024 г



**Инструкция по применению
на медицинское изделие
версия 1.1**

**Одежда медицинская одноразовая нестерильная «Белспецстиль»
ТУ 14.12.30-002-0133875447-2021**

Введение

В настоящей инструкции по применению описано медицинское изделие Одежда медицинская одноразовая нестерильная «Белспецстиль» (далее – набор одежды, изделие) ТУ 14.12.30-002-0133875447-2021

Информация о производителе (изготовителе) изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «БЕЛСПЕЦСТИЛЬ» (ООО «ТД «БЕЛСПЕЦСТИЛЬ»)

Адрес: 308023, Белгородская область, г. Белгород, 5-й Заводской пер., д. 30, офис 15

Телефон: +7 (4722)205-595

e-mail: zakupki@bss31.ru

Наименование медицинского изделия

Одежда медицинская одноразовая нестерильная «Белспецстиль» ТУ 14.12.30-002-0133875447-2021, в вариантах исполнения:

1. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №1 в составе:
 - комбинезон плотностью 40 г/м², размер М, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (на выбор) - 1 шт.;
 - шапочка – 1 шт.;
 - бахилы высокие - 1 пара (при необходимости);
 - инструкция по применению – 1 шт.
2. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №2 в составе:
 - комбинезон, плотностью 60 г/м², размер М, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (на выбор) - 1 шт.;
 - шапочка – 1 шт.;
 - бахилы высокие - 1 пара (при необходимости);
 - инструкция по применению – 1 шт.
3. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №3 в составе:
 - халат изолирующий, размер XL, 2XL, 3XL (на выбор) - 1 шт.;
 - шапочка - 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.
4. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №4 в составе:
 - халат изолирующий с манжетами, размер XL, 2XL, 3XL (на выбор) - 1 шт.;
 - шапочка - 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.
5. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №5 в составе:
 - халат процедурный, размер XL, 2XL, 3XL (на выбор) - 1 шт.;
 - шапочка - 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.
6. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №6 в составе:
 - халат процедурный с манжетами, размер XL, 2XL, 3XL (на выбор) - 1 шт.;
 - шапочка - 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.
7. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №7 в составе:

- костюм изолирующий (куртка, брюки), размер XL, 2XL, 3XL (на выбор) - 1 шт.;
- шапочка – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

8. Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №8 в составе:

- накидка - 1 шт.;
- шапочка - 1 шт.;
- нарукавники - 1 пара (при необходимости);
- инструкция по применению – 1 шт.

Назначение медицинского изделия

Предназначена для ношения медицинскими работниками во время осмотра пациента, для поддержания гигиены и предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами и загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом.

Классификация

В зависимости от потенциального риска применения изделия относятся к классу 1 по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией согласно Приказу Минздрава России №4н от 6 июня 2012 г – 332470.

Область применения и потенциальные потребители

Область применения: лечебные, лечебно-профилактические, санитарные учреждения (стационарные и амбулаторные).

Потенциальные потребители: Изделие предназначено для применения медперсоналом в условиях специализированных лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Показания к применению

Применять для защиты персонала лечебных и санитарных учреждений, врачебного и санитарного состава, занятых организацией и проведением противоэпидемических мероприятий, в том числе: диагностикой, лечением, оказанием медицинской помощи пациентам, выполнением лабораторных исследований и дезинфекционных работ.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов.

Побочные эффекты

Индивидуальная непереносимость материалов.

Меры предосторожности

- Запрещается применения комбинезона в случае, если упаковка была открыта или повреждена.
- Запрещается применение комбинезона по истечении срока годности.
- Запрещается повторное применение комбинезона.
- Запрещается стерилизация комбинезона

Информация о стерильности

Изделие одноразовое, поставляется в нестерильном виде и не требует стерилизации до и после применения.

Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Изделие не содержит каких-либо лекарственных средств и материалов животного или человеческого происхождения.

Условия эксплуатации

При эксплуатации изделия необходимо предохранять от механических повреждений.

Условия эксплуатации изделий соответствуют климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, температура от +10°C до + 35°C; относительная влажность – 80 % при температуре 25°C.

Условия хранения

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от минус 0 °C до плюс 35 °C. Изделие должно храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, и относительной влажности не более 80% при температуре 25°C.

Условия транспортирования

Допускается транспортировать изделия всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 (температура воздуха: от минус 50 до плюс 50°C; значение относительной влажности воздуха: верхнее – 100% при плюс 25°C, среднегодовое – 75% при плюс 15 °C.

В процессе транспортирования и хранения изделия в транспортной упаковке не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер.

Сведения об утилизации

Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, подвергаются обеззараживанию и утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, относящимися к медицинским отходам класса Б.

Изделия с истекшим сроком годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, относящимися к медицинским отходам класса А.

Комплектность

В комплект поставки изделия должны входить:

№ п/п	Наименование изделия	Комплект поставки
1.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №1	– комбинезон плотностью 40 г/м2 соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка – 1 шт.; – бахилы высокие - 1 пара (при необходимости). – инструкция по применению - 1 шт.
2.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №2	– комбинезон плотностью 60 г/м2 соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка – 1 шт.; – бахилы высокие - 1 пара (при необходимости). – инструкция по применению - 1 шт.
3.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №3	– Халат изолирующий соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка - 1 шт.; – Инструкция по применению – 1 шт.
4.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №4	– Халат изолирующий с манжетами соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка - 1 шт.; – Инструкция по применению – 1 шт.
5.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №5	– Халат процедурный соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка - 1 шт.; – Инструкция по применению – 1 шт.
6.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №6	– Халат процедурный с манжетами соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка - 1 шт.; – Инструкция по применению – 1 шт.

7.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №7	– Костюм изолирующий (куртка, брюки) соответствующего размера – 1 шт.; – Шапочка – 1 шт.; – Инструкция по применению – 1 шт.
8.	Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» №8	– Накидка соответствующего размера – 1 шт.; – шапочка - 1 шт.; – нарукавники - 1 пара (при необходимости); – Инструкция по применению – 1 шт.

Описание медицинского изделия и его основные технические характеристики

Комбинезон

Комбинезон изготовлен из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 40 г/м² и 60 г/м²

Цвет изделия – белый.

Комбинезон дополнен капюшоном и застежкой-молнией.

Размеры комбинезонов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Размер	Интервал обхвата груди человека, см	Интервал роста человека, см
М	80-84	158-164
L	88-92	158-164
XL	96-50	170-176
2XL	104-108	170-176
3XL	112-116	182-188
4XL	120-124	182-188
5XL	128-132	194-200

Измерения готовых комбинезонов должны соответствовать рисункам 1, 2 и таблице 2
Рисунок 1.

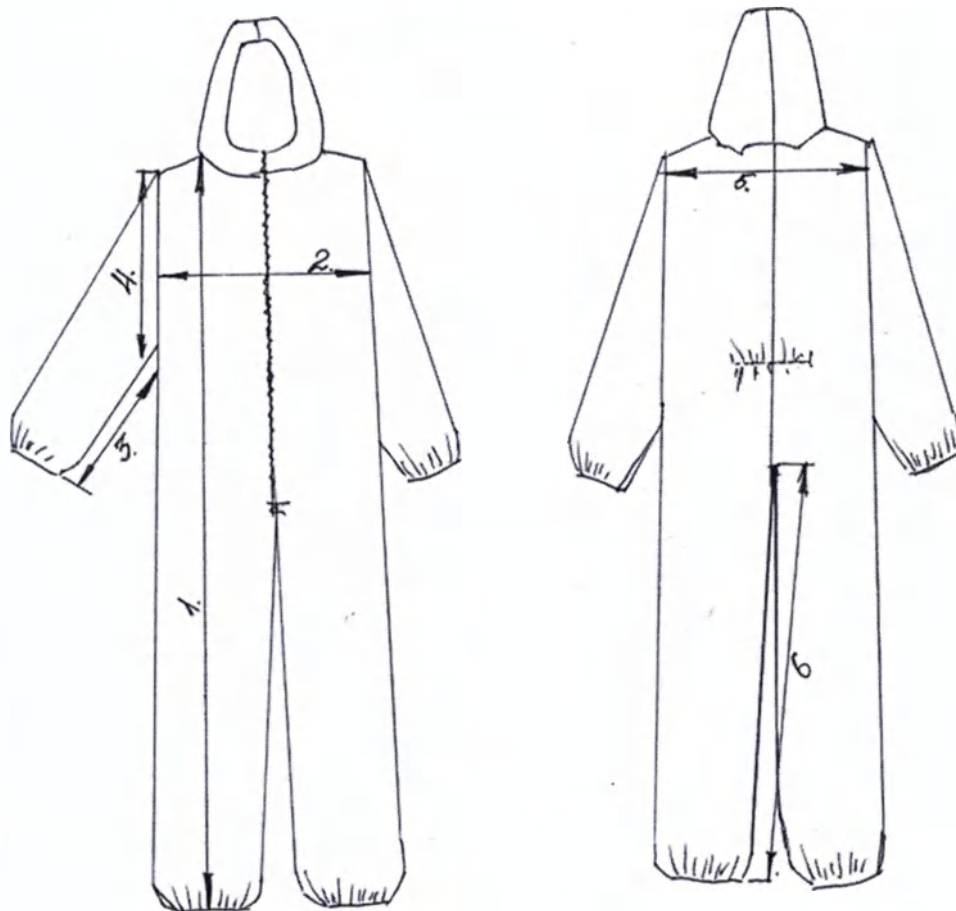


Рисунок 2.

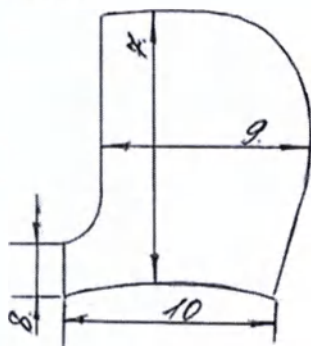


Таблица 2

Номер измере- ния на чертеже	Наименование места измерения	М	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
1.	Длина полочки (измеряют от высшей точки плечевого шва до низа), см ($\pm 10\%$)	161,0	168,0	170,5	173,5	180,5	185,5	193,0
2.	Ширина комбинезона по линии груди, см ($\pm 10\%$)	52,0	55,0	55,0	62,0	68,0	73,0	82,0

3.	Длина рукава по внутренней стороне, см ($\pm 10\%$)	72,0	71,0	71,5	68,0	71,5	75,5	76,5
4.	Глубина проймы, см ($\pm 10\%$)	39,5	39,5	39,5	40,5	42,0	44,5	48,0
5.	Ширина комбинезона по плечам, см ($\pm 10\%$)	52,0	55,0	55,0	62,0	68,0	72,0	82,0
6.	Длина штанины по внутреннему шву, см ($\pm 10\%$)	69,0	75,0	78,0	79,0	83,5	87,0	100,5
7.	Высота капюшона, см ($\pm 10\%$)	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	37,0
8.	Высота воротниковой части ($\pm 10\%$)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
9.	Ширина затылочной части ($\pm 10\%$)	25,0	25,0	26,0	26,0	27,0	30,0	30,0
10.	Длина по шву втачивания капюшона ($\pm 10\%$)	32,0	32,0	33,0	33,0	34,0	36,0	36,0

Масса комбинезона представлена в таблице 3

Таблица 3

Наименование изделия	Масса изделия, г. ($\pm 0,5$)						
	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Комбинезон 40 г/м ²	122	128	130	136	154	166	186
Комбинезон 60 г/м ²	184	194	196	208	230	248	282

Халаты

Халаты изготовлены из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 25 г/м².

Цвет изделия должен соответствовать таблице 4:

Таблица 4

Халат изолирующий	белый, голубой
Халат изолирующий с манжетами	белый, голубой
Халат процедурный	белый
Халат процедурный с манжетами	белый

Размеры халатов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в таблице 5.

Таблица 5

Размер	Интервал обхвата груди человека, см	Интервал роста человека, см
XL	96-100	158-164
2XL	104-108	170-176
3XL	112-116	182-188

Измерения готовых халатов должны соответствовать рисункам 3-8 и таблицам 5-10.

Рисунок 3. Халат изолирующий

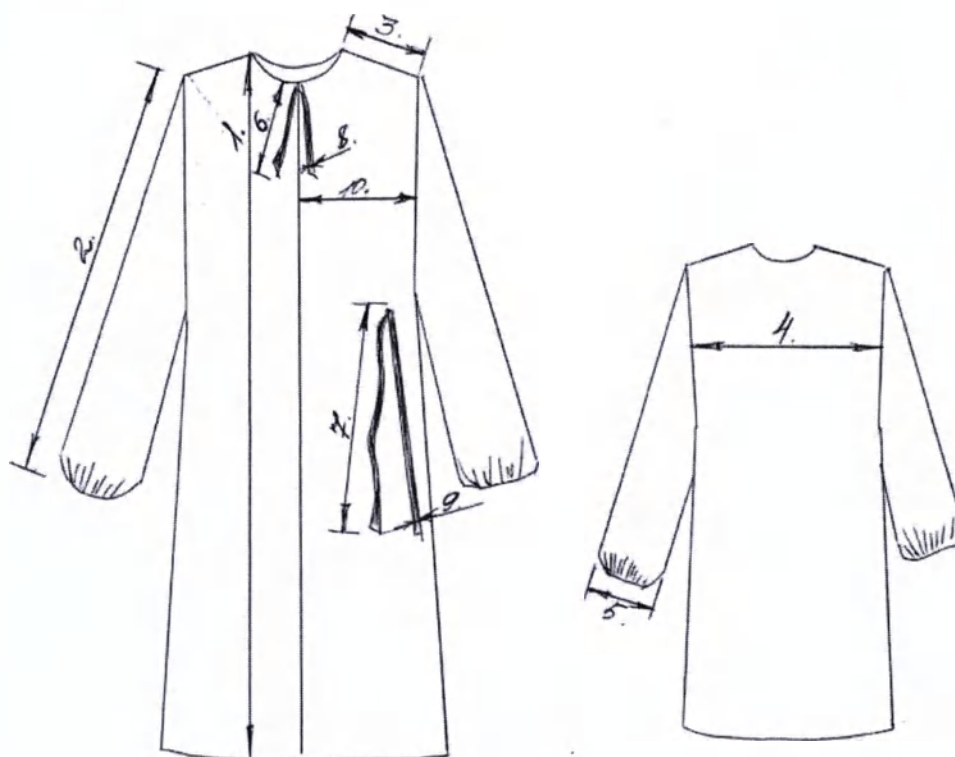


Таблица 6

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	XL	2XL	3XL
1.	Длина полочки (измерять от высшей точки плечевого шва до низа полочки), см ($\pm 10\%$)	110,0	140,0	140,0
2.	Длина рукава, см ($\pm 10\%$)	58,5	58,5	58,5
3.	Ширина плеча, см ($\pm 10\%$)	16,5	16,5	21,0
4.	Ширина халата на уровне глубины проймы, см ($\pm 10\%$)	70,0	70,0	80,0
5.	Ширина рукава (измерять внизу при растянутой эластичной ленте), см ($\pm 10\%$)	15,0	15,0	15,5
6.	Длина завязки (горловина), см ($\pm 10\%$)	25,0	25,0	25,0
7.	Длина пояса (измерять 2 половины в сумме), см ($\pm 10\%$)	160,0	160,0	160,0
8.	Ширина завязки (горловина), см ($\pm 10\%$)	1,0	1,0	1,0
9.	Ширина пояса, см ($\pm 10\%$)	2,0	2,0	2,0
10.	Ширина полочки, см ($\pm 10\%$)	35,0	35,0	40,0

Рисунок 4. Халат изолирующий с манжетами

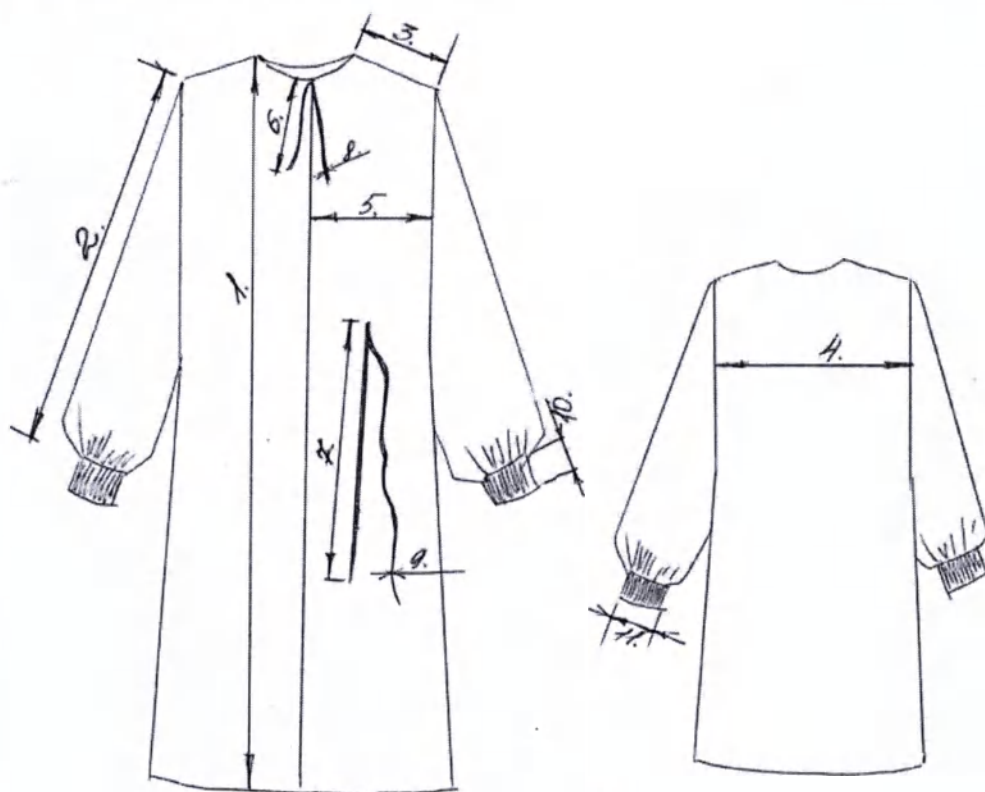


Таблица 7

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	XL	2XL	3XL
1.	Длина полочки (измерять от высшей точки плечевого шва до низа полочки), см ($\pm 10\%$)	110,0	140,0	140,0
2.	Длина рукава, см ($\pm 10\%$)	55,0	55,0	55,0
3.	Ширина плеча, см ($\pm 10\%$)	16,5	16,5	21,0
4.	Ширина халата на уровне глубины проймы, см ($\pm 10\%$)	70,0	70,0	80,0
5.	Ширина полочки, см ($\pm 10\%$)	35,0	35,0	40,0
6.	Длина завязки (горловина), см ($\pm 10\%$)	25,0	25,0	25,0
7.	Длина пояса (измерять 2 половины в сумме), см ($\pm 10\%$)	160,0	160,0	160,0
8.	Ширина завязки (горловина), см ($\pm 10\%$)	1,0	1,0	1,0
9.	Ширина пояса, см ($\pm 10\%$)	2,0	2,0	2,0
10.	Высота манжета ($\pm 10\%$)	6,0	6,0	6,0
11.	Ширина манжета ($\pm 10\%$)	7,0	7,0	7,0

Рисунок 5. Халат процедурный

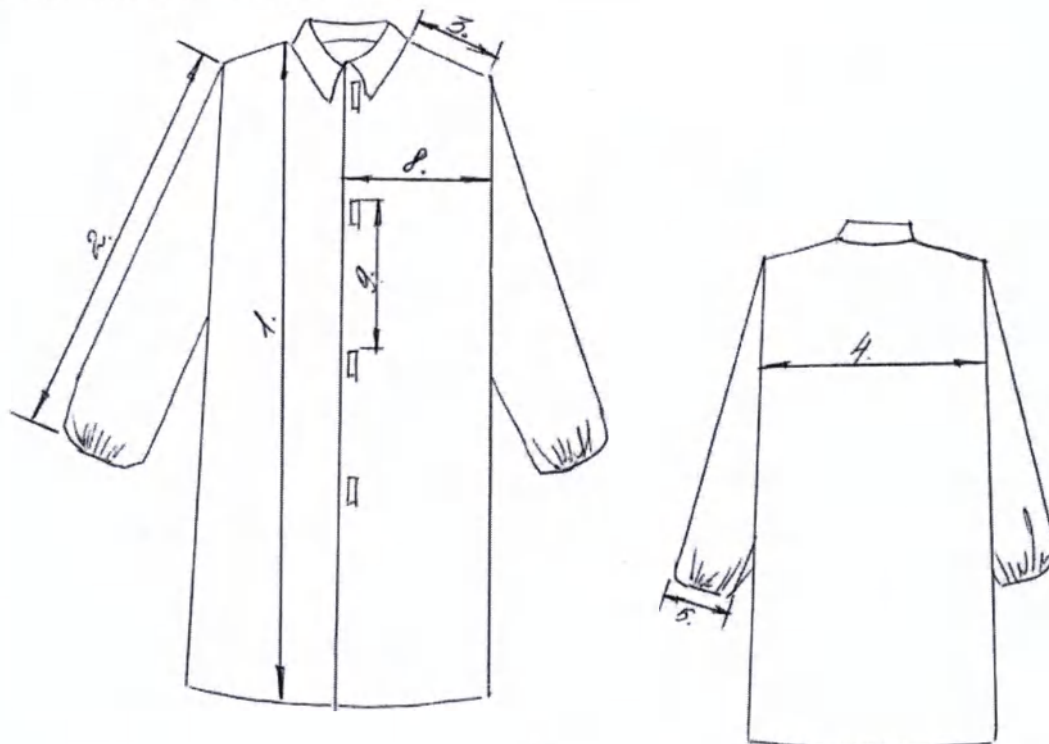


Рисунок 6

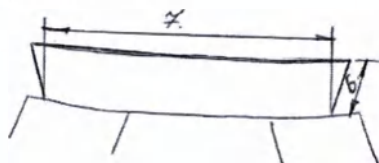


Таблица 8

Номер измерения на чертеже	Наименование места Измерения	XL (140*110)	2XL (140*140)	3XL (160*140)
1.	Длина полочки (измерять от высшей точки плечевого шва до низа полочки), см ($\pm 10\%$)	110,0	120,0	140,0
2.	Длина рукава, см ($\pm 10\%$)	62,0	66,0	66,0
3.	Ширина плеча, см($\pm 10\%$)	23,0	23,0	27,5
4.	Ширина халата на уровне глубины проймы, см ($\pm 10\%$)	71,0	71,0	81,0
5.	Ширина рукава (измерять внизу при растянутой эластичной ленте), см ($\pm 10\%$)	17,0	17,0	17,0
6.	Ширина воротника в концах, см ($\pm 10\%$)	10,5	10,5	10,5
7.	Длина воротника, см ($\pm 10\%$)	54,0	54,0	57,0
8.	Ширина полочки, см ($\pm 10\%$)	36,0	36,0	36,0

9.	Расстояние между липучками, кнопками, см ($\pm 10\%$)	23,0	23,0	26,0
----	---	------	------	------

Рисунок 7. Халат процедурный с манжетами

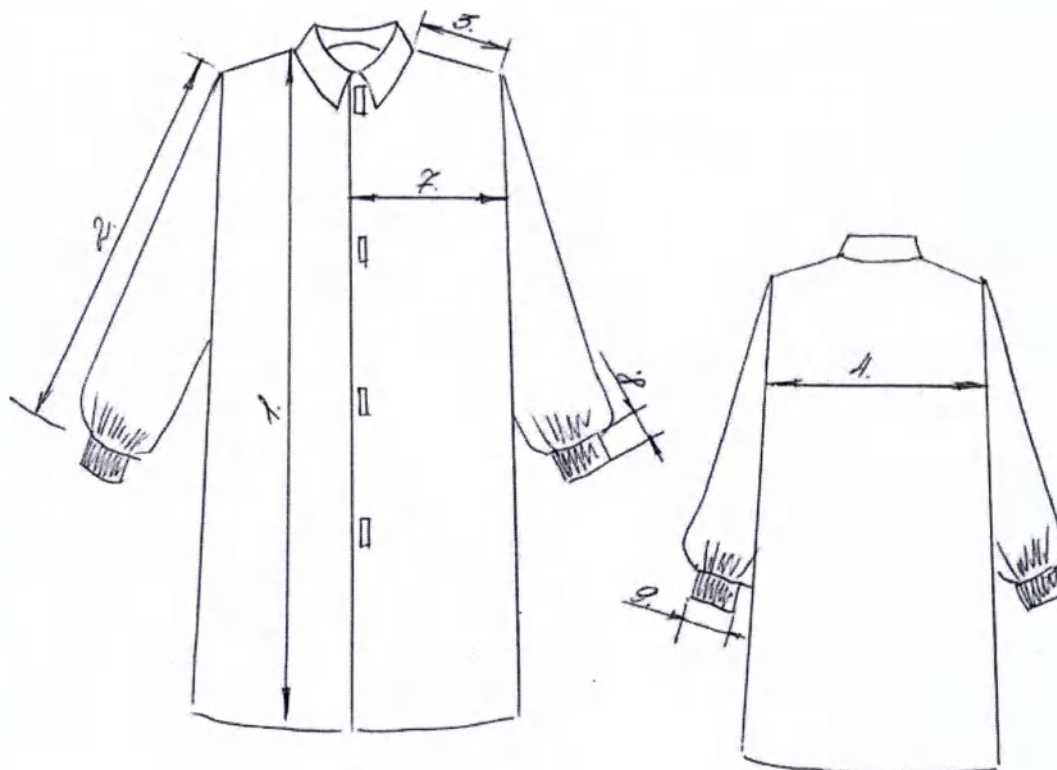


Рисунок 8

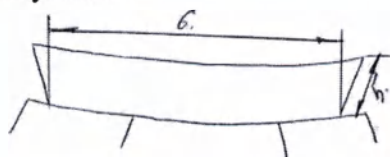


Таблица 9

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	XL (140*110)	2XL (140*140)	3XL (160*140)
1.	Длина полочки (измерять от высшей точки плечевого шва до низа полочки), см ($\pm 10\%$)	110,0	120,0	140,0
2.	Длина рукава, см ($\pm 10\%$)	58,0	62,0	62,0
3.	Ширина плеча, см ($\pm 10\%$)	23,0	23,0	27,5

4.	Ширина халата на уровне глубины проймы, см ($\pm 10\%$)	71,0	71,0	81,0
5.	Ширина воротника в концах, см ($\pm 10\%$)	10,5	10,5	10,5
6.	Длина воротника, см ($\pm 10\%$)	54,0	54,0	57,0
7.	Ширина полочки, см ($\pm 10\%$)	36,0	36,0	41,0
8.	Высота манжета ($\pm 10\%$)	6,0	6,0	6,0
9.	Ширина манжета ($\pm 10\%$)	7,0	7,0	7,0
10.	Расстояние между липучками, кнопками, см ($\pm 10\%$)	23,0	23,0	26,0

Масса изделия указана в таблице 10

Таблица 10

Наименование изделия	Масса изделия, г. ($\pm 10\%$)		
	XL	2XL	3XL
Халат изолирующий	56	64	72
Халат изолирующий с манжетами	59	67	75
Халат процедурный	58	64	78
Халат процедурный с манжетами	61	67	81

Костюм изолирующий (куртка, штаны)

Костюм изолирующий изготовлен из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 40 г/м².

Цвет изделия – белый.

Размеры костюмов должны соответствовать параметрам измерения, указанным в таблице 11.

Таблица 11

Параметры измерения	Размеры		
	XL	2XL	3XL
Обхват груди, см	94-102	102-110	110-118
Обхват талии, см	84-92	92-100	100-108
Обхват бедер, см	100-106	106-112	112-118
Рост типовой фигуры человека, см	170-176	182-188	182-188

Измерения готовых костюмов должны соответствовать рисунку 9 и таблице 12.

Рисунок 9

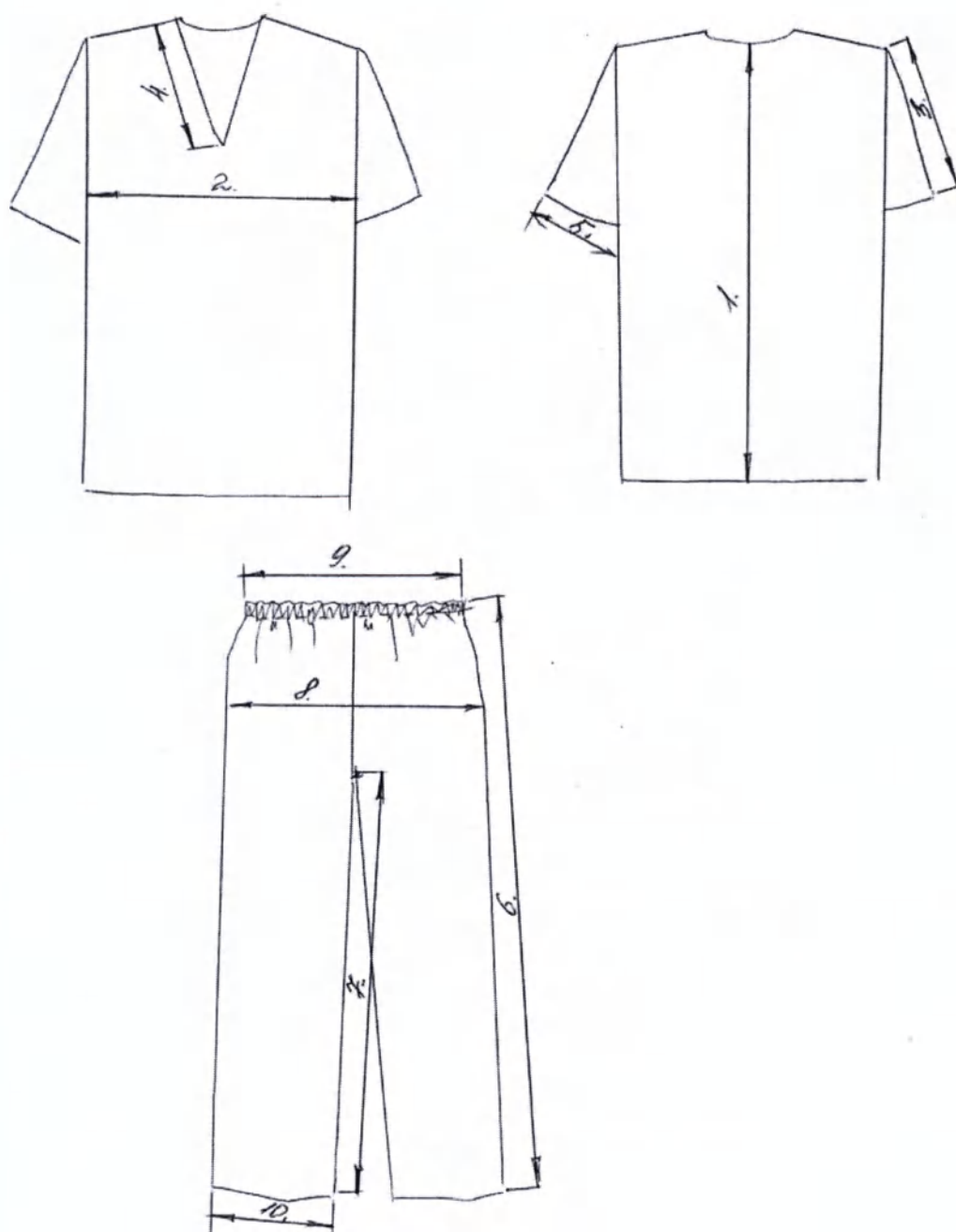


Таблица 12

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	XL	2XL	3XL
Куртка				
1.	Длина куртки по спинке, см ($\pm 10\%$)	78,0	78,0	79,0
2.	Ширина куртки на уровне глубины проймы, см ($\pm 10\%$)	58,0	62,0	66,0
3.	Длина рукава от высшей точки оката до низа, см ($\pm 10\%$)	31,0	33,0	33,0

4.	Длина выреза горловины, см ($\pm 10\%$)	24,0	24,0	24,0
5.	Ширина рукава внизу, см ($\pm 10\%$)	20,0	21,0	22,0
Брюки				
6.	Длина по боковому шву, см ($\pm 10\%$)	116,0	116,0	116,0
7.	Длина по шаговому шву, см ($\pm 10\%$)	80,5	80,5	80,0
8.	Ширина на уровне среднего шва, см ($\pm 10\%$)	58,0	61,0	65,0
9.	Ширина по линии талии, см ($\pm 10\%$) измерять внизу при растянутой резинке	54,0	58,0	62,0
10.	Ширина брюк внизу, см ($\pm 10\%$)	24,0	24,5	25,0

Масса костюма представлена в таблице 13

Таблица 13

Наименование изделия	Масса изделия, г. ($\pm 10\%$)		
	XL	2XL	3XL
Костюм изолирующий	102	108	114

Накидка

Накидка изготовлена из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 25 г/м².

Цвет изделия – белый.

Размеры накидки должен соответствовать параметрам измерения, указанным в таблице 14.

Таблица 14

Размеры, см (длина*ширина)
110*140 ($\pm 10\%$)
110*160 ($\pm 10\%$)

Измерения готовых накидок должны соответствовать рисунку 10 и таблице 15

Рисунок 10

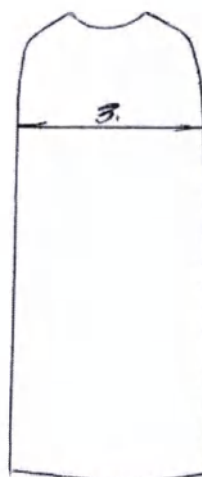
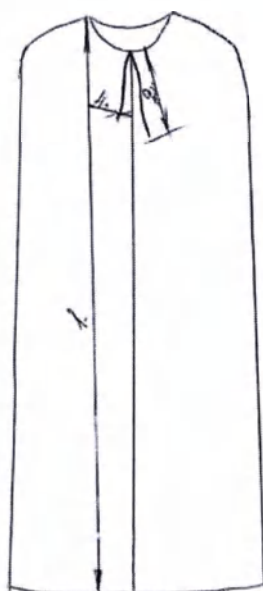


Таблица 15

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Размер 110*140	Размер 110*160
1.	Длина полочки (измерять от высшей точки плечевого шва до низа полочки), см ($\pm 10\%$)	110,0	110,0
2.	Длина завязки (горловина), см ($\pm 10\%$)	25,0	25,0
3.	Ширина накидки (в сложенном состоянии), см ($\pm 10\%$)	70,0	80,0

Масса накидки представлена в таблице 16

Таблица 16

Наименование изделия	Масса изделия, г. ($\pm 10\%$)
Накидка	38

Нарукавники

Нарукавники изготовлены из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 40 г/м².

Цвет изделия – белый, голубой.

Размер нарукавников определяется длиной и шириной изделия и должен соответствовать таблице 17.

Таблица 17

N n/n	Размеры, см (длина*ширина)
1.	38*40 ($\pm 10\%$)
2.	40*40 ($\pm 10\%$)
3.	40*45 ($\pm 10\%$)

Измерения готовых нарукавников должны соответствовать рисунку 11 и таблице 18.

Рисунок 11

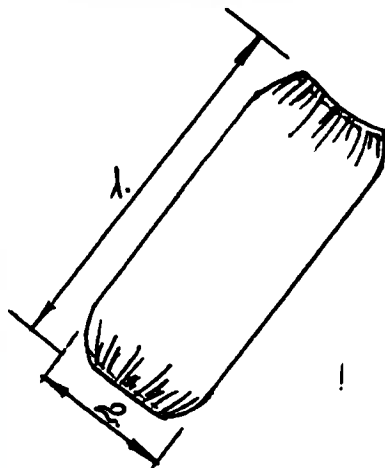


Таблица 18

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Размер 38*40	Размер 40*40	Размер 40*45
1.	Длина нарукавника, см ($\pm 10\%$)	38,0	40,0	40,0
2.	Ширина нарукавника, см ($\pm 10\%$)	20,0	20,0	22,5

Масса нарукавников представлена в таблице 19

Таблица 19

Наименование изделия	Масса изделия, г. ($\pm 10\%$)		
Нарукавники, пара	38*40	40*40	40*45
	12	14	16

Шапочка

Шапочка изготовлена из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 12 г/м².

Цвет изделия – голубой, белый.

Измерения готовой шапочки должны соответствовать рисунку 12 и таблице 20.

Рисунок 12

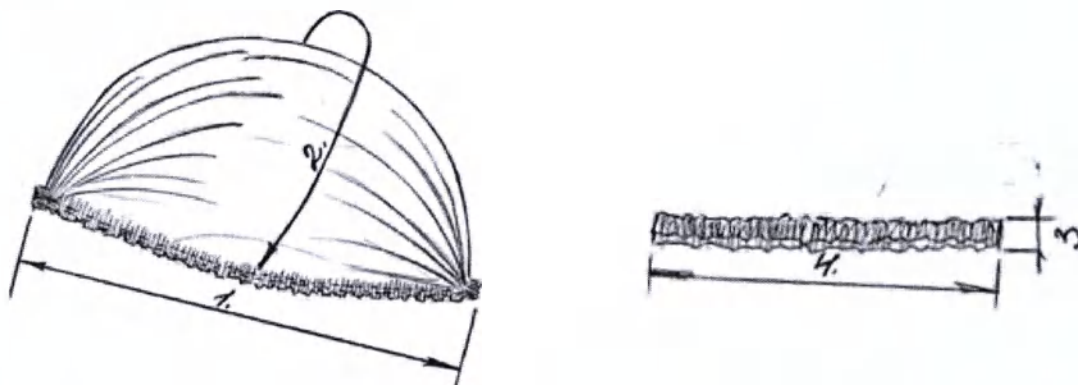


Таблица 20

Номер измерения	Наименование места измерения	Значение измерения
1.	Длина (измерение производят параллельно складкам, в растянутом виде), см ($\pm 10\%$)	50,0
2.	Ширина (измерение производят в растянутом виде), см ($\pm 10\%$)	45,0
3.	Ширина (измерение производят в сложенном виде), см ($\pm 10\%$)	2,5
4.	Длина (измерение производят параллельно складкам, в сложенном виде), см ($\pm 10\%$)	18

Масса шапочки представлена в таблице 21

Таблица 21

Наименование изделия	Масса изделия, г. ($\pm 10\%$)
Шапочка, шт.	3,0

Бахилы высокие

Бахилы изготовлены из спанбонда (полотна нетканого из полипропиленовых волокон), плотностью 40 г/м².

Цвет изделия – белый, голубой.

Измерения готовых бахил должны соответствовать рисунку 13 и таблице 22.

Рисунок 13

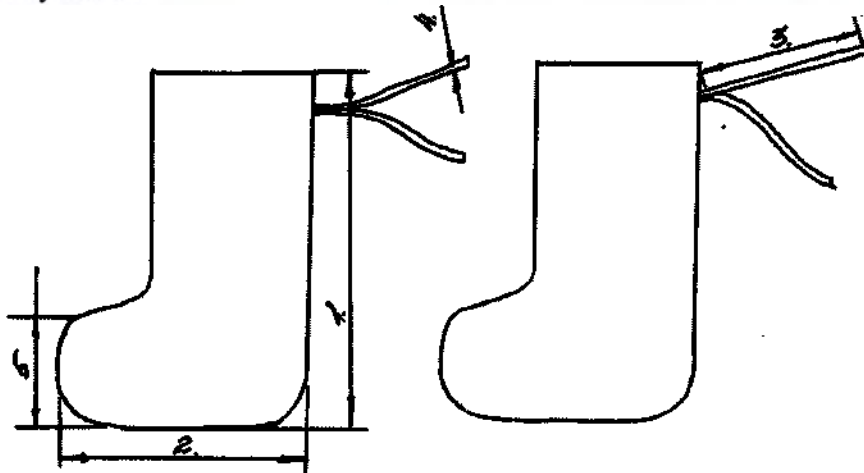


Таблица 22

Номер измерения на рисунке	Наименование места измерения	Значение измерения
1.	Высота (измеряется от верхнего края до низа), см ($\pm 10\%$)	65,0
2.	Длина следа (измеряется от пяточной части до носка), см ($\pm 10\%$)	40,0
3.	Длина завязок, см ($\pm 10\%$)	33,0
4.	Ширина завязок, см ($\pm 10\%$)	2,5
5.	Высота в области носка, см ($\pm 10\%$)	15,0

Масса изделий – 36 ($\pm 10\%$) г.

Гарантии производителя (изготовителя) и срок годности изделия

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 14.12.30-002-0133875447-2021, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок годности – 3 года с даты производства.

Информация о документе

Версия 1.0 Инструкции по применению медицинского изделия «Набор одежды медицинской одноразовой нестерильной «Белспецстиль» ТУ 14.12.30-002-0133875447-2021.

Информация о способе применения изделия

! Вся одежда является одеждой второго слоя - должна надеваться поверх хлопчатобумажного белья. Не допускается одевать на голое тело!

! Перед одеванием - снимите ювелирные украшения и часы.

Комбинезон

Надевание комбинезона

Вскрыть упаковку, достать комбинезон.

Комбинезон необходимо одевать не спеша, тщательно, с тем, чтобы во время работы не поправлять изделие.

Наденьте комбинезон и застегните до пояса;

Наденьте обувь (принадлежность поставляется отдельно);

Наденьте защитную полумаску и проверьте прилегание (принадлежность поставляется отдельно);

Наденьте защитные очки (принадлежность поставляется отдельно);

Наденьте капюшон и застегните молнию до верха;

Наденьте защитные перчатки поверх манжет комбинезона (принадлежность поставляется отдельно).

Снятие комбинезона.

! Защитную одежду снимают после проведения работ в специально выделенном помещении в обратном порядке:

Дезинфицируйте защитные перчатки (принадлежность поставляется отдельно);

Снимите капюшон и стягивайте комбинезон до пояса, выворачивая его наизнанку. Одновременно вынимайте руки из рукавов (возможна помощь другого человека с защитными перчатками и в защитной полумаске);

Снимите полностью комбинезон, вместе с обувью (принадлежность поставляется отдельно);

Снимите защитные перчатки вывернув их наизнанку (принадлежность поставляется отдельно);

Снимите защитные очки за концы дужек (принадлежность поставляется отдельно);

Снимите защитную полумаску за эластичные резинки (принадлежность поставляется отдельно);

Проведите дезинфекцию рук, лица с помощью дезинфицирующего лосьона и смойте водой. Комбинезон предназначен для одноразового применения. Не используйте повторно!

Халаты

Надевание халата

Вскрыть упаковку, достать халат.

Халат необходимо одевать не спеша, тщательно, с тем, чтобы во время работы не поправлять изделие.

Наденьте халат и застегните (завяжите пояс);

Наденьте защитную полумаску и проверьте прилегание (принадлежность поставляется отдельно);

Наденьте защитные перчатки поверх манжет халата (принадлежность поставляется отдельно).

Снятие халата.

! Защитную одежду снимают после проведения работ в специально выделенном помещении в обратном порядке:

Дезинфицируйте защитные перчатки (принадлежность поставляется отдельно);

Одновременно вынимайте руки из рукавов (возможна помощь другого человека с защитными перчатками и в защитной полумаске);

Снимите полностью халат;

Снимите защитные перчатки вывернув их наизнанку (принадлежность поставляется отдельно);

Снимите защитную полумаску за эластичные резинки (принадлежность поставляется отдельно);

Проведите дезинфекцию рук, лица с помощью дезинфицирующего лосьона и смойте водой. Халат предназначен для одноразового применения. Не используйте повторно!

Накидка

- Вскрыть упаковку, достать накидку.
- Накинуть накидку на плечи и завязать завязки в районе горловины.
- Снимать накидку необходимо в обратной последовательности.
- После применения накидку утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Нарукавники

- вскрыть упаковку,
- вынуть изделие из упаковки,
- надеть на руку, расправить нарукавник и удобно разместить фиксирующие резинки.

- После применения нарукавники утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Шапочка

- вскрыть упаковку,
- вынуть изделие из упаковки,
- раскрыть гофрированную полосу (гармошку) пальцами,
- надеть на голову, чтобы шапочка закрывала полностью волосы, расправить для удобства, использовать по назначению.
- После применения утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Бахилы высокие

- извлечь бахилы,
- проверить их целостность,
- надеть на обувь


После использования утилизировать с бытовыми отходами.

Список стандартов, согласно которым изготовлено изделие

Обозначение	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 12.4.175-88	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Нормы проницаемости микроорганизмами.
ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 32522-2013	Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия.
ГОСТ 7625-86	Бумага этикеточная. Технические условия.
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ Р 53226-2008	Полотна нетканые. Методы определения прочности
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.
ГОСТ Р 51517-99	Изделия швейные. Метод определения максимальной разрывной нагрузки шва при растяжении пробы полоской.
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска.
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность
Приказ Минздрава №4н от 06.06.2012	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

Символы

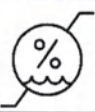	Код партии
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Диапазон влажности
	Температурный диапазон
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не допускать воздействия влаги
	Евразийский знак соответствия
	Запрет на повторное использование
	Не использовать при повреждении упаковки и

	обратиться к инструкции по применению
	Верх

Правила представления рекламаций

При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции по применению, нежелательных реакции при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации, необходимо направлять сообщение, содержащие указанные сведения в уполномоченный орган/организацию в сфере здравоохранения, а также в адрес производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «БЕЛСПЕЦСТИЛЬ» (ООО «ТД «БЕЛСПЕЦСТИЛЬ»)

Адрес: 308023, Белгородская область, г. Белгород, 5-й Заводской пер., д. 30, офис 15

Телефон: +7 (4722)205-595

e-mail: zakupki@bss31.ru

Прошито и пронумеровано 23 листов

подпись

