

Кресло-коляска с ручным приводом

ТУ 9451-001-17664448-2015

ПАСПОРТ

Изготовитель: «Меритс-Рус Продакшн» (РФ)

Адрес: 109004, г. Москва, Шелапутинский переулок, дом 1

Модель: L303s, L303m, L303l - Максимальная масса пользователя, 110кг

Модель: M420, M420n - Максимальная масса пользователя, 114 кг

Модель: L303xl, L303xxl - Максимальная масса пользователя, 125 кг

Основные технические характеристики моделей кресел-колясок, в соответствии с ТУ 9451-001-17664448-2015, указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование характеристики	Исполнение (модель)						
	M420	M420n	L303s	L303m	L303l	L303xl	L303xxl
Полная длина с под - ножкой , мм +/- 10мм	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Полная ширина , мм +/- 10мм	630	580	630	650	680	700	730
Ширина сложенного кресла-коляски, мм +/- 10мм	300	300	300	300	300	300	300
Высота сложенного кресла-коляски, мм +/- 10мм	920	920	890	890	890	890	890
Высота , мм +/- 10мм	920	920	890	890	890	890	890
Высота сиденья, мм +/- 10мм	490	490	510	510	510	510	510
Эффективная глубина сиденья, мм +/- 10мм	400	400	400	400	400	400	400
Эффективная ширина сиденья, мм +/- 10мм	460	400	400	430	460	480	510
Угол наклона сиденья +/- 1°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°

Угол наклона спинки +\ - 1°	34°	34°	34°	34°	34°	34°	34°
Высота спинки, мм +\ - 10мм	400	400	400	400	400	400	400
Общая масса, кг +\ -0,1кг	19	18,5	15	15,2	15,4	15,6	15,8
Масса самой тяжелой части, кг. +\ -0.1кг	13.5	13	10	10.2	10.4	10.6	10.8
Длина подножки, мм +\ - 10мм	340- 460	340-460	340-460	340-460	340-460	340-460	340-460
Угол наклона подножки +\ -1°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Высота подножки мм +\ - 10мм	60- 180	60-180	60-180	60-180	60-180	60-180	60-180
Высота подлокотника, мм +\ -10мм	230	230	230	230	230	230	230
Расстояние от подлокотника до спинки, мм +\ -10мм	315	315	315	315	315	315	315
Диаметр ручного обода, мм +\ -10мм	500	500	500	500	500	500	500
Горизонтальное положение оси. мм +\ - 3мм	20	20	20	20	20	20	20
Минимальный радиус разворота, мм +\ -10мм	650	650	650	650	650	650	650

Масса испытательного манекена используемого при испытаниях равнялась максимальной массе пользователя.

Кресло коляска соответствует следующим международным стандартам:

- Технические требования и методы испытания на статическую, ударную и усталостную прочность по ISO 7171-144;
- Требования стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ISO 7176-164;
- EN ISO13485:2003+AC:2007; EN ISO 9001:2008

Модель: М420; М420п



Модель: L303s:L303m:L303l:L303xl:L303xxl



Комплект поставки

Базовый комплект поставки кресла-коляски соответствует перечню, указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт
Рама кресла-коляски в сборе	1
Ведущее колесо с ободом-толкателем и быстросъемной осью	2
Подножка быстросъемная	2
Ремень для пятки	2
Ремень для фиксации пользователя в кресле	1
Балансир против опрокидывания кресла назад	2
Горизонтальная рукоятка (push bar)	1
Навесные ручные тормоза для помощника, везущего кресло	2
Отражатели на колеса для темного времени суток	2
Подушка для сиденья	1
Приспособление для крепления трости	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

Кресло-коляска L303 на каркасе из алюминиевого сплава в пяти исполнениях: L303s; L303m; L303l; L303xl; L303xxl дополнительно комплектуется транспортными колесами диаметром 75 мм.

Комплекта поставки согласовывается с заказчиком в зависимости от двигательной активности пользователя.

Кресла-коляски с ручным приводом, предназначенные для самостоятельного передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями. Кресло-коляска приводятся в движение пользователем или сопровождающим его лицом и может эксплуатироваться как внутри, так и вне помещений по дорогам с твердым покрытием. Компактная конструкция позволяет использовать кресло-коляску в узких пространствах. Съемные регулируемые подлокотники, съемные свободно качающиеся опоры для ног, нажимные тормоза, композитные ножные опоры с ремнями для пятки обеспечивают комфорт и функциональность

Модели, по согласованию с заказчиком, могут комплектоваться различными типами колес указанными в таблице 3.

Тормоза

Кресло- коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полной остановки.

Колеса

Характеристика колес для комплектации кресла-коляски представлена в таблице 2

Таблица 3

Наименование колеса	Диаметр, см	Ширина см	Вид колеса по типу шины	Материал колеса	Толщина обода, мм
Заднее ведущее	60	3,44	пневматическое	сталь	15.7
Заднее ведущее	60	3,44	цельнолитое	сталь	15.7
Заднее ведущее	60	3,44	пневматическое	алюминий	18.8
Заднее ведущее	60	3.44	цельнолитое	алюминий	18.8
Переднее поворотное	20	3.13	пневматическое	пластик	-
Переднее пов.	20	3.13	цельнолитое	пластик	-
Переднее пов.	20	5,0	пневматическое	пластик	-
Переднее пов.	20	5,0	полиуретановое	пластик	-
Переднее пов.	20	2.5	цельнолитое	пластик	-

Гарантийные обязательства.

Гарантируется соответствие кресла-коляски требованиям нормативных документов (ГОСТ Р51081-97, ГОГСТ Р 51083-97)

при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты и повреждения вызванные злоупотреблениями, аварийными происшествиями и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 2 года.

Сведения о регистрации

Регистрационное удостоверение –

Срок действия –

Декларация о соответствии

Срок действия -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствия такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправности в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

Принято в архив

