

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАО «ОРТО-С»

192029, Россия,
Санкт-Петербург
ул. Купчинская, 29
т: (812) 574-52-69, 574-52-70
ф: (812) 574-52-34
e-mail: info@orto-s.ru
<http://www.orto-s.ru>

ЗАО «ОРТО-С» ИНН 7816078029 КПП 781601001
р/с 40702810614000002229
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790 КПП 781601001
ОКПО 35454708 ОКОНХ 91514



Распорка детская «Разводящая с манжетами» (по типу «Шины Виленского») ПНО-34

ТУ 9396-097-55220088-2009

Памятка по пользованию

Распорка детская «Разводящая с манжетами» (по типу «Шины Виленского»)
ПНО-34 (далее - распорка) предназначены для лечения дисплазии и врожденного вывиха бедра в процессе проводимого комплекса восстановительного лечения.

Распорки предназначены для пользования в условиях повседневной жизни.

1. ОПИСАНИЕ РАСПОРКИ

Распорка представляет собой разводящую штангу с модулями, которые обеспечивают крепление изделия на нижних конечностях ребенка. Первый модуль (полукольцо) обеспечивает удержание бедер в положении сгибания тазобедренного сустава, второй (манжетка) - позволяет зафиксировать распорку на теле ребенка.

Длина штанги регулируется ограничительными винтами. Для увеличения степени отведения бедер штангу следует раздвинуть. Для этого раскручивают ограничительные винты в торце штанги

Фиксация распорки на теле и бедрах ребенка осуществляется съёмными текстильными лямками с застежкой «Контакт».

2. НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПОРКАМИ

Когда производится регулировка шины?

- 2.1. Уложить ребенка на спину, согнуть ноги в коленях и развести бедра
- 2.2. Распорки надеть на ребенка таким образом, чтобы раздвижная часть шины находилась в области живота, а манжеты располагались на нижней трети бедер.
- 2.3. Зафиксировать распорку при помощи ремней.
- 2.4. Распорка не должна оказывать болезненного давления на костные выступы и мышечные ткани в зафиксированном положении.

3. УХОД ЗА РАСПОРКАМИ.

- 3.1. Металлические части шины следует периодически протирать влажной салфеткой.
- 3.2. Крепление в виде фланелевых лямок стирать с помощью моющего раствора.

4. УХОД ЗА КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ.

Проводить гигиеническую обработку кожных покровов не реже двух раз в сутки теплым мыльным раствором.

5. РЕМОНТ РАСПОРКИ.

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу распорок в течении 6 месяцев при условии правильной эксплуатации.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входит:

- распорка— 1 шт.
- лямки 2 комплекта
- памятка по пользованию - 1 экз.

Сброшюровано,
пронумеровано

3 (три)

лист а



О.В. Старовойтова